


eversense[®] XL

دليل المستخدم

دليل لاستخدام نظام مراقبة الجلوكوز
المستمرة Eversense XL

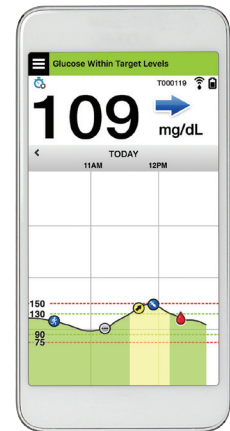

تطبيق الهاتف المحمول



علامة Eversense XL التجارية

Eversense XL و Eversense XL Sensor و Eversense XL CGM و Eversense XL Continuous Glucose Monitoring و Eversense XL Smart Transmitter و Eversense XL App و شعار Eversense XL هي علامات تجارية مملوكة لشركة Senseonics, Incorporated. الماركات الأخرى ومنتجاتها هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعنيين.

المحتويات

31	4. إدخال المستشعر وربطه	5	قاموس المصطلحات
34	5. استخدام جهاز الإرسال الذكي	7	1. مقدمة
35	الاستخدام اليومي	7	المساعدة والدعم
36	تثبيت جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر الذي تم إدخاله	8	مكونات نظام Eversense XL CGM
39	تشغيل جهاز الإرسال الذكي وإيقاف تشغيله	12	متطلبات النظام
40	العناية بجهاز الإرسال الذكي وصيانته	12	اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية
40	مؤشر البطارية	12	أجهزة بدون قیود
41	مؤشرات LED للحالة	12	الشاشة المكسورة أو الزر المكسور
42	6. معايرة النظام	13	دواعي الاستخدام
44	مراحل المعايرة	13	معلومات السلامة الخاصة بالتصوير
46	كيفية المعايرة	14	بالرنين المغناطيسي (MRI)
51	7. استخدام التطبيق	14	موانع الاستعمال
52	فحص إعدادات جهازك المحمول	15	ما الموجود في هذه العبوة
53	إدارة حساب Eversense	15	كيفية استخدام دليل المستخدم هذا
54	تعرف على شاشة "My Glucose"	16	2. المزايا والمخاطر
57	أسهم الاتجاهات	17	المخاطر والآثار الجانبية
58	الرسم البياني للاتجاه	17	تحذيرات
59	خيارات القائمة	19	تنبيهات
60	صورة الملف الشخصي	21	3. بدء التشغيل
61	8. تخصيص إعداداتك	22	شحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك
63	ضبط مستويات الجلوكوز المستهدفة	24	الخطوة 1. تنزيل التطبيق وتثبيته
		25	الخطوة 2. قم بإعداد التطبيق - إنشاء الحساب والإقران والإعدادات

109	12. مشاركة بياناتي
	برنامج Eversense Data
109	Management Software (DMS)
110	Sync
111	My Circle
	13. معلومات المنتج والمعلومات العامة على التطبيق
112	
	14. عرض بيانات Eversense XL على ساعة Apple Watch
114	
115	عرض Glance
	15. My Circle
117	المراقبة عن بُعد باستخدام نظام Eversense XL CGM وتطبيق Eversense NOW
123	16. حول المستشعر
124	خطوات الإدخال
125	خطوات الإخراج
126	17. السفر
127	18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
127	جهاز الإرسال الذكي
129	بطارية جهاز الإرسال الذكي والشحن
130	الاتصال مع جهاز الإرسال الذكي

65	ضبط مستويات تنبيه الجلوكوز
67	ضبط التنبيهات التنبيهية
69	ضبط تنبيهات معدل التغير
71	تعيين أوقات المعايرة اليومية
72	ضبط معلومات النظام
73	ضبط جدول أوقات الوجبات
74	ضبط الأصوات
76	ضبط الملف الشخصي المؤقت
79	تسجيل الخروج

80	9. أوصاف التنبيه
80	التنبيهات والإشعارات
81	Alert History
82	أوصاف التنبيهات وإجراءاتها

99	10. سجل الأحداث
100	الجلوكوز
101	الوجبات
102	الأنسولين
103	الصحة
104	التمارين

105	11. التقارير
106	الملخص الشكلي الأسبوعي
107	الرسم البياني الدائري للجلوكوز
108	إحصائيات الجلوكوز

155	الرموز على تطبيق Eversense XL للأجهزة المحمولة
157	الرموز الموجودة على العبوة والأجهزة
159	الضمان المحدود لجهاز إرسال Eversense XL الذكي

162 إشعارات قانونية

162	إشعار قانوني خاص بشركة Apple
162	إشعار قانوني خاص بشركة Google
162	معلومات حول Bluetooth®
162	علامة Bluetooth® التجارية
163	معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية

164 الفهرس

134	المعايرة
136	التنبهات والإشعارات
137	قراءات الجلوكونز
138	أسهم الاتجاهات
139	التطبيق
140	المستشعر
142	الاختصارات
142	الأحداث
142	المزامنة

143 19. أداء الجهاز

143	الأداء في الدراسة السريرية ونظرة عامة عليها
143	الدراسة PRECISE
144	تحليل شبكة الأخطاء من كلارك
146	أداء المعايرة
147	الدراسات PRECISE II/PRECISION
147	دراسات الجدوى
148	ارتداء جهاز الإرسال الذكي
148	السلامة

149 20. المواصفات الفنية

149	المستشعر
150	جهاز الإرسال الذكي
151	*كابل USB للشحن والتنزيل
151	الإمداد بالطاقة والشاحن
152	المعايير الكهربائية والخاصة بالسلامة

المعلومات.

التداخل الكهرومغناطيسي مجال طاقة قوي تولده الأجهزة الكهربائية أو المغناطيسية.

EULA اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

تطبيق Eversense XL App تطبيق برمجي مثبت على جهاز محمول ويُستخدم في عرض بيانات الجلوكوز الخاصة بمراقبة الجلوكوز المستمرة التي يتم إرسالها من جهاز الإرسال الذكي.

Eversense DMS تطبيق يعتمد على الإنترنت متوافق مع تطبيق Eversense XL App حيث يتم تخزين بيانات الجلوكوز ويمكن استعراضها.

Eversense NOW تطبيق محمول خاص بالمراقبة عن بُعد يتيح لك إمكانية مشاركة بيانات الجلوكوز الخاصة بك مع أشخاص آخرين.

FAQ الأسئلة المتكررة

قراءة "HI" تشير إلى أن قراءة مستشعر الجلوكوز أعلى من 400 mg/dL.

ارتفاع سكر الدم نوبة من ارتفاع الجلوكوز بالدم.

انخفاض سكر الدم نوبة من انخفاض الجلوكوز بالدم.

السائل الخلالي (ISF) السائل الموجود بين الخلايا في الجسم. يقيس Eversense XL CGM الجلوكوز في عينة من السائل الخلالي، مقابل الجلوكوز في عينة دم مأخوذة من وخز الإصبع.

تنبيه يحذرك التنبيه من أن هناك موقعًا يحتاج إلى انتباهك وينبغي أن تستجيب/تتخذ إجراءً مناسبًا.

جهاز قياس الجلوكوز بالدم جهاز متاح بشكل تجاري يُستخدم لقياس الجلوكوز باستخدام عينة دم من وخز الإصبع.

Bluetooth® اسم علامة تجارية لتقنية شبكات لاسلكية تستخدم ترددات اللاسلكي (RF) قصيرة الموجات للاتصال بالأجهزة المحمولة والأجهزة الإلكترونية اللاسلكية الأخرى.

المعايرة قراءة جلوكوز الدم من عينة وخز إصبع تم إدخالها إلى تطبيق Eversense XL App للتحقق من دقة النظام. مع نظام Eversense XL، توجد مرحلتان: مرحلة البدء المطلوب خلالها 4 اختبارات بوخز الإصبع ومرحلة المعايرة اليومية المطلوب خلالها اختبار واحد بوخز الإصبع مرتين يوميًا.

CGM مراقبة الجلوكوز المستمرة مراقبة مستويات الجلوكوز لديك باستمرار من السائل الخلالي كل عدة دقائق.

موانع الاستعمال حالة أو ظرف ينبغي فيه على الشخص ألا يستخدم الجهاز.

CT التصوير المقطعي المحوسب

وضع عدم الإزعاج (DND) في تطبيق Eversense XL App

عند تمكين هذا الوضع، سيتوقف تطبيق الهاتف المحمول عن عرض التنبيهات غير الحرجة وسيتوقف جهاز الإرسال الذكي عن تقديم إشعارات بالذبذبة للتنبيهات غير الحرجة. تحتوي الكثير من الأجهزة المحمولة على "وضع عدم إزعاج" منفصل. راجع تعليمات الشركة المنتجة للاطلاع على المزيد من

جهاز بدون قيود جهاز (iPhone أو iPod) تم تعديله لإزالة عناصر التحكم والقيود التي وضعتها الشركة المنتجة الأصلية.

LED صمام ثنائي باعث للضوء

المستشعر المرتبط مستشعر متصل بجهاز إرسال ذكي.

قراءة "LO" تشير إلى قراءة مستشعر جلوكوز تقل عن 40 mg/dL.

الجهاز المحمول جهاز محمول باليد يعتمد على نظام تشغيل محمول يقوم بتشغيل تطبيق Eversense XL App ويتصل بجهاز الإرسال الذكي.

mg/dL ملليجرام في الديسيلتر، وهي وحدة قياس تبيين تركيز مادة معينة في كمية معينة من السائل. في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتم عرض نتائج اختبارات الجلوكوز بوحدة mg/dL مما يوضح مقدار الجلوكوز في الدم عند استخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم، أو يوضح مقدار الجلوكوز في السائل الخلالي عند استخدام بعض نظم مراقبة الجلوكوز المستمرة مثل نظام Eversense XL CGM.

mmol/L مللي مول في اللتر، وهي وحدة قياس تبيين تركيز مادة معينة في كمية معينة من السائل. في العديد من البلدان، يتم عرض نتائج اختبارات الجلوكوز بوحدة mmol/L مما يوضح مقدار الجلوكوز في الدم عند استخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم، أو يوضح مقدار الجلوكوز في السائل الخلالي عند استخدام بعض نظم مراقبة الجلوكوز المستمرة مثل نظام Eversense XL CGM.

MRI التصوير بالرنين المغناطيسي

أسهم معدل التغير/الاتجاه مؤشرات لاتجاه التغير وسرعته في

مستويات الجلوكوز في دمك.

المراقبة عن بُعد ميزة اختيارية تتيح لك إمكانية دعوة آخرين إلى الاطلاع على بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بك باستخدام Eversense NOW، وهو تطبيق منفصل للأجهزة المحمولة يتم تنزيله إلى جهاز محمول متوافق.

المستشعر جهاز يتم إدخاله تحت الجلد لقياس مستويات الجلوكوز في السائل الخلالي باستمرار.

إعداد الغفوة يُستخدم لضبط معدل تكرار تنبيه.

تحت الجلد يقع تحت البشرة.

جهاز الإرسال الذكي جهاز قابل لإعادة الاستخدام يتم ارتداؤه من الخارج فوق المستشعر الذي تم إدخاله ويقوم بتشغيل المستشعر ويرسل معلومات الجلوكوز إلى الجهاز المحمول لعرضها في تطبيق Eversense XL App.

مرحلة الإحماء الفترة التي يحتاج إليها المستشعر للضبط بعد إدخاله وقبل عمليات المعايرة.

١. مقدمة

يستعرض هذا القسم كيفية استخدام هذا الدليل ويصف نظام Eversense XL CGM الجديد الخاص بك، بما في ذلك مكوناته والغرض المقصود منه.

تهانينا لحصولك على أحدث تقنية لمساعدتك في إدارة مرض السكري الذي تعاني منه. نظام Eversense XL CGM مع مستشعر Eversense XL طويل العمر يهدف إلى قياس مستويات الجلوكوز باستمرار طوال عمر تشغيل المستشعر. وتُرسل معلومات الجلوكوز التي جمعها النظام إلى جهازك المحمول تلقائيًا. يجب أن تتصل بمكتب مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد لإدخال المستشعر وإخراجه.

المساعدة والدعم

يرجى مراجعة دليل المستخدم هذا مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك. لطرح المزيد من الأسئلة عن منتج Eversense XL واستكشاف مشاكله وإصلاحها، اتصل بالرقم المجاني لدعم العملاء في الولايات المتحدة على الرقم (844) 736-7348. ومن خارج الولايات المتحدة، اتصل بموزعك المحلي أو قم بزيارة الموقع <https://global.eversensedidiabetes.com/> لتحديد موقع موزعك المحلي.

مكونات نظام Eversense XL CGM

يتضمن النظام (1) مستشعر صغير يتولى مزود الرعاية الصحية إدخاله تحت الجلد و (2) جهاز إرسال ذكي قابل للإزالة يتم ارتداؤه فوق المستشعر و (3) تطبيق للهاتف المحمول لعرض قراءات الجلوكوز.



المستشعر

مستشعر Eversense XL

يتم إدخال المستشعر تحت الجلد (أعلى الذراع) ويقيس الجلوكوز في السائل الخلالي. ثم يحسب جهاز الإرسال الذكي مستويات الجلوكوز هذه ويرسلها إلى التطبيق. يدوم مستشعر Eversense XL حتى 180 يومًا. سيقدم لك النظام إشعارات من خلال تطبيق الهاتف المحمول لكي تتمكن من تحديد مواعيد الاستبدال.

جهاز إرسال Eversense XL الذكي


يتم ارتداء جهاز الإرسال الذكي القابل للإزالة خارجيًا فوق المستشعر ويقوم بتشغيل المستشعر. ويرسل بيانات الجلوكوز لاسلكيًا (عبر تقنية Bluetooth) إلى تطبيق الجهاز المحمول. كما يقدم جهاز الإرسال الذكي تنبيهات مذبذبة على الجسم بناءً على إعدادات الجلوكوز التي تختارها. يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن وهو قابل لإعادة الاستخدام لمدة تصل إلى عام.



جهاز الإرسال الذكي

تطبيق Eversense XL

تطبيق Eversense XL App عبارة عن تطبيق برمجي يعمل على جهاز محمول (مثل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي) ويعرض بيانات الجلوكوز بعدة طرق. كما يقدم تنبيهات بناء على إعدادات الجلوكوز التي تختارها.

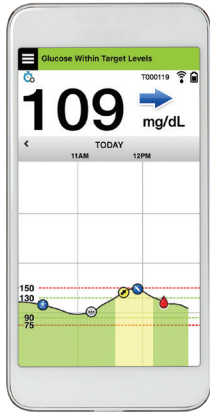

iOS



Android

سيختلف شكل شاشات تطبيق Eversense XL على حسب طراز جهازك المحمول و/أو نظام تشغيله. أدرجنا بعض الأمثلة على هذه الاختلافات في دليل المستخدم هذا. تأكد من أن جهازك المحمول يستخدم أحدث نظام تشغيل.

مهم: لكي تستخدم نظام Eversense XL CGM، يجب أن تكون على علم بتنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة واستخدامها على جهازك المحمول. يتم إرسال البيانات من جهاز إرسال Eversense XL الذكي لاسلكيًا عبر تقنية Bluetooth. اقرأ بعناية التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا لتنزيل تطبيق Eversense XL للأجهزة المحمولة وتنصيبته وإقران جهازك المحمول مع جهاز الإرسال الذكي. إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه في دليل المستخدم هذا، فيرجى الاتصال بموزعك المحلي.

الرقعات اللاصقة للاستخدام لمرة واحدة يوميًا مشمولة أيضًا كجزء من النظام وسيوفرها لك مزودر عابنتك الصحية بعد إدخال المستشعر. الرقعة لها جانب لاصق من الأكريليك يلتصق بالجانب الخلفي في جهاز الإرسال الذكي وجانب لاصق من السيليكون يلتصق بالجلد.

نظرة عامة على نظام Eversense XL

مطلوب نظام منفصل لمراقبة جلوكوز الدم (لا تقدمه شركة Senseonics) لمعايرة نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة ولاتخاذ قرارات العلاج. عند استخدام هذه المكونات بالشكل الملائم فإنها تعمل معًا لتساعد في ضمان حصولك على مراقبة الجلوكوز المستمرة طوال عمر تشغيل المستشعر.

لضمان حصولك على قراءات الجلوكوز المستمرة والمعلومات الأخرى، اتبع نصائح الاستخدام اليومي هذه:

- ✓ قم بارتداء جهاز الإرسال الذكي الخاص بك طوال الوقت باستثناء وقت الشحن.
- ✓ جهاز الإرسال الذكي مقاوم للماء حتى عمق متر واحد (3.2 أقدام) لمدة 30 دقيقة. سيؤدي تعريض جهاز الإرسال الذكي لظروف بخلاف هذه إلى التلف وإلغاء ضمانك.
- ✓ احرص على أن يحتوي جهاز الإرسال الذكي على ما يكفي من طاقة البطارية طيلة الوقت.
- ✓ قم بإجراء اختباري معايرة على جهاز قياس الجلوكوز بالدم كل يوم عندما يُطلب منك ذلك.
- ✓ عليك الاهتمام بالتنبيهات والإشعارات التي تتلقاها من جهاز الإرسال الذكي الخاص بك وجهازك المحمول.
- ✓ استبدل الرقعة اللاصقة الموجودة على جهاز الإرسال الذكي الخاص بك يوميًا.
- ✓ يمكنك إزالة جهاز الإرسال الذكي من أعلى الذراع في أي وقت إلا أثناء المعايرة. تذكر أنه لا يتم جمع أي بيانات إذا لم يكن جهاز الإرسال الذكي متصلًا بالمستشعر. عندما تعيد جهاز الإرسال الذكي إلى موضع المستشعر، ستستغرق إعادة اتصال المستشعر وقراءات الجلوكوز 10 دقائق لتظهر في التطبيق.
- ✓ عندما لا يكون جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول ضمن نطاق بعضهما البعض، يتم تخزين أي بيانات جمعها جهاز الإرسال الذكي وإرسالها إلى التطبيق عندما يعود الجهاز المحمول وجهاز الإرسال الذكي إلى النطاق مرة أخرى.
- ✓ من الآمن بالنسبة لك أن ترتدي المستشعر وجهاز الإرسال الذكي أثناء مرورك عبر أجهزة كشف المعادن في المطارات. أثناء الطيران، يعمل جهاز الإرسال الذكي مثل أي جهاز آخر بتقنية Bluetooth. احرص على اتباع إرشادات السلامة المحددة التي تقرضها شركة الطيران.

بعض ميزات نظام Eversense XL CGM:

- اتصال لاسلكي بالمستشعر وجهاز الإرسال الذكي والتطبيق.
- ارتداء المستشعر لمدة طويلة أعلى الذراع طوال عمر تشغيل المستشعر.
- تنبيهات عند الوصول إلى مستويات تنبيه الجلوكوز المنخفضة أو المرتفعة (انخفاض سكر الدم أو ارتفاع سكر الدم) المحددة مسبقًا.
- تنبيهات تنبئية تتيح لك إمكانية المعرفة **قبل** الوصول إلى مستويات تنبيه الجلوكوز المنخفضة أو المرتفعة المحددة مسبقًا.
- استخدام جهاز محمول (مثل الهاتف الذكي) لعرض قراءات الجلوكوز.
- تنبيهات مذبذبة على الجسم باستخدام جهاز الإرسال الذكي حتى عندما لا يكون الجهاز المحمول قريبًا.
- يقدم قراءات ضمن نطاق 40 - 400 mg/dL كل 5 دقائق.
- أسهم اتجاهات توضح ما إذا كانت قيم الجلوكوز ترتفع أم تنخفض لديك ومدى سرعة ذلك.
- الرسومات البيانية والإحصاءات التي توضح نتائج الجلوكوز بتنسيقات سهلة الفهم.
- جهاز إرسال ذكي قابل للإزالة وإعادة الشحن.
- إمكانيات إدخال أحداث (مثل الوجبات والتمارين والأنسولين).
- تخزين بيانات الجلوكوز في التطبيق وعلى جهاز الإرسال الذكي.
- يوفر إمكانية المراقبة عن بُعد لأشخاص آخرين باستخدام تطبيق الأجهزة المحمولة Eversense NOW.

متطلبات النظام

- نظام Eversense XL CGM.
- هاتف ذكي متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام Android أو Apple iPhone® أو iPod® أو iPad® المجهزة بتقنية Bluetooth Smart (أو Bluetooth Low Energy). كما يعمل تطبيق Eversense XL App مع Apple Watch®. يرجى تصفح الموقع <https://global.eversensedibabetes.com/compatibility> لرؤية قائمة كاملة بالأجهزة وأنظمة التشغيل المتوافقة.
- للاطلاع على قائمة بالأجهزة المتوافقة، يرجى الانتقال إلى الموقع <https://global.eversensedibabetes.com/compatibility>.
- تطبيق Eversense XL CGM الذي تم تنزيله إلى جهازك المحمول من متجر التطبيقات Apple App Store أو Google Play™.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية

يخضع استخدام تطبيق Eversense XL App لأحدث الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لتطبيق Eversense XL App وسياسة الخصوصية لتطبيق Eversense XL App. يتم تحديث هذه المستندات من وقت لآخر ويتم نشرها على الموقع <https://global.eversensedibabetes.com/>.

أجهزة بدون قيود

لا تستخدم تطبيقات Eversense على أجهزة iPhone أو iPod التي بدون قيود. لا توفر الأجهزة التي بدون قيود مستوى مقبولاً من الأمان والدقة للمستخدم وهي غير معتمدة للاستخدام من شركة Senseonics.

الشاشة المكسورة أو الزر المكسور

إذا كانت شاشة جهازك المحمول مكسورة أو إذا كانت الأزرار لا تعمل، فقد لا تتمكن من استخدام نظام Eversense XL الخاص بك وقد تفوتك أحداث انخفاض الجلوكوز أو ارتفاعه.

دواعي الاستخدام

يوصف نظام Eversense XL CGM لقياس مستويات الجلوكوز في السائل الخلالي باستمرار لدى البالغين (18 عامًا فأكثر) المصابين بالسكري طوال عمر تشغيل المستشعر.

يهدف النظام إلى:

- المساعدة في التعامل مع السكري.
 - توفير قراءات الجلوكوز في الوقت الفعلي.
 - توفير معلومات حول اتجاه الجلوكوز.
 - توفير تنبيهات لاكتشاف وتوقع نوبات انخفاض الجلوكوز بالدم (انخفاض سكر الدم) وارتفاع الجلوكوز بالدم (ارتفاع سكر الدم).
- يمكنك تفسير البيانات التاريخية المأخوذة من النظام للمساعدة في إدخال تعديلات على العلاج. ينبغي أن تستند هذه التعديلات إلى الأنماط والاتجاهات التي تظهر مع الوقت.
- يوصف النظام للاستخدام كجهاز إضافي لإكمال المعلومات التي تم الحصول عليها من أجهزة مراقبة جلوكوز الدم المنزلية القياسية وليس ليحل محلها.

معلومات السلامة الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

يمكن فحص المريض المستخدم للجهاز على نحو آمن داخل مساحة رنين مغناطيسي (MR) ذات أنبوب أفقي مغلق تليي الشروط التالية:

- المجال المغناطيسي الثابت يبلغ 1.5 تسلا أو 3.0 تسلا.
- أقصى تدرج للمجال المكاني 1900 جاوس/سم (≥ 19 تسلا/م)
- أقصى نظام رنين مغناطيسي مذكور، معدل الامتصاص النوعي (SAR) المتوسط للجسم بالكامل يبلغ 4 وات/كجم (وضع التشغيل المراقب بالمستوى الأول) لمدة 15 دقيقة من المسح المتواصل، أو معدل الامتصاص النوعي يبلغ 2 وات/كجم لمدة 30 دقيقة من المسح المتواصل.

في ظل ظروف المسح المذكورة أعلاه، من المتوقع أن تحقق نتائج الاختبارات غير السريرية المشيرة إلى مستشعر Eversense أقصى ارتفاع في درجة الحرارة لا يزيد عن 5.4 درجة مئوية.

في الاختبارات غير السريرية، تحدث عيوب التصوير بواسطة جهاز يمتد إلى 2.83 بوصة (72 مم) تقريباً من مستشعر Eversense عند التصوير بتتابع نبضات متدرجة الصدى ونظام رنين مغناطيسي 3T.

لم يُختبر مستشعر Eversense في أنظمة الرنين المغناطيسي التي لا تلبي الشروط أعلاه. وقد يؤدي تعريض مستشعر Eversense لشروط تصوير بالرنين المغناطيسي خارج الشروط المذكورة أعلاه إلى التسبب في تداعيات محتملة مثل ترحيل الجهاز، أو ارتفاع الحرارة وتلف الأنسجة أو تآكل الجلد.

جهاز إرسال Eversense الذكي غير آمن مع الرنين المغناطيسي ويجب إزالته قبل الخضوع لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي. قبل أن تخضع لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، أخبر طاقم التصوير بأنك تستخدم مستشعر Eversense وجهاز إرسال ذكياً.

قد ترغب في مشاركة هذه المعلومات مع طاقم التصوير بالرنين المغناطيسي.

للحصول على أحدث إصدارات تصنيفات نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) Eversense، تفضل بزيارة <https://global.eversensedidiabetes.com/>

موانع الاستعمال

- يُمنع استعمال النظام مع الأشخاص الممنوعين من التعرض لمادة ديكساميثازون أو أسيتات ديكساميثازون.
- جهاز الإرسال الذكي غير متوافق مع إجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي. ويجب ألا يخضع المرضى لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي عند ارتداء جهاز الإرسال الذكي. للاطلاع على معلومات بخصوص المستشعر، يُرجى الاطلاع على معلومات السلامة الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي.
- قد يؤدي المانيتول أو السوربيتول عند إعطائهما في الوريد أو كمكون في محلول إرواء أو محلول غسيل الكلى الصفاقي إلى زيادة تركيز المانيتول أو السوربيتول في الدم مما يسبب قراءات مرتفعة بشكل زائف لنتائج مستشعر الجلوكوز. يُستخدم السوربيتول في بعض المحليات الصناعية ولا تؤثر مستويات التركيز في الوجبات العادية في نتائج مستشعر الجلوكوز.

ما الموجود في هذه العبوة

تحتوي عبوة جهاز إرسال Eversense XL الذكي هذه على ما يلي:



كابل الشحن

(سيضمن طقم جهاز الإرسال الذكي الخاص بك قابلاً للجدار يلائم الاستخدام في منطقتك المحلية).



حامل الشحن



جهاز إرسال Eversense XL الذكي

تحتوي هذه العبوة أيضاً على دليل المستخدم هذا ودليل مرجعي سريع (ليس معروضاً).

كيفية استخدام دليل المستخدم هذا

يصف هذا الدليل كيفية استخدام نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة. اقرأ الدليل بالكامل قبل استخدام النظام.

- كل التحذيرات أو التنبيهات معلّمة في مربع.
- نصائح المستخدم مسبقة بالرمز ✓.

2. المزاي والمخاطر

يصف هذا القسم المزايا والتوقعات والمخاطر المرتبطة باستخدام نظام Eversense XL CGM.

تساعد مراقبة الجلوكوز المستمرة في التعامل مع السكري والتحكم في الجلوكوز، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة حياتك. تتحقق أفضل النتائج عندما تكون على علم تام بالمخاطر والمزايا وعملية الإدخال ومتطلبات المتابعة ومسؤوليات الرعاية الذاتية. ينبغي عدم إدخال المستشعر لجسمك إذا كنت لا تستطيع تشغيل نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة بالشكل الملائم.

يعمل نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة على قياس الجلوكوز في السائل الخلالي (ISF) بين خلايا الجسم. قد تتسبب الاختلافات الفسيولوجية بين السائل الخلالي والدم المأخوذ من جهاز القياس بوخز الأصبع في اختلافات قياسات الجلوكوز. وتصبح هذه الاختلافات أكثر وضوحاً أثناء أوقات التغير السريع في جلوكوز الدم (أي، بعد تناول الطعام، جرعة الأنسولين، أو التدريب)، وعند البعض، خلال الأيام القليلة الأولى بعد الإدخال بسبب الالتهاب الذي قد ينتج عن إجراء الإدخال. مستويات الجلوكوز في السائل الخلالي تتأخر عن مستويات الجلوكوز في الدم لعدة دقائق.

يتضمن المستشعر حلقة من السيليكون تحتوي على كمية صغيرة من دواء مضاد للالتهاب (أسيات ديكساميثازون). لم يحدد ما إذا كانت المخاطر المرتبطة بمادة أسيات ديكساميثازون القابلة للحقن تسري على حلقة إفراز أسيات ديكساميثازون داخل المستشعر. تطلق حلقة الإفراز قدرًا صغيراً من أسيات ديكساميثازون عندما يتلامس المستشعر مع سوائل الجسم فتعمل على تقليل الاستجابة الالتهابية في الجسم للمستشعر الذي تم إدخاله. كما قد تسبب مادة أسيات ديكساميثازون الموجودة في الحلقة أحياناً مناعة أخرى لم تظهر سابقاً مع الشكل القابل للحقن. للاطلاع على قائمة بالآثار المنوطة المحتملة المرتبطة بأسيات ديكساميثازون، تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك.

التعديلات غير المصرح بها في المعدات، والاطلاع على المعلومات التي بداخلها بشكل غير ملائم أو "إزالة قيود" نظامك واتخاذ أي إجراءات أخرى غير مصرح بها قد يؤدي إلى تعطل نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة وقد يعرضك للخطر. لا يُسمح بالتعديلات غير المصرح بها في المعدات وتؤدي إلى إلغاء ضمانك.

يجب إبلاغ جهة التصنيع والهيئة المختصة بالولاية العضو الخاصة بك بأي حادث خطير يقع فيما يتعلق باستخدام الجهاز.

المخاطر والآثار الجانبية

لن تقوم التنبيهات والإشعارات الخاصة بالجلوكوز بإصدار إشعار صوتي للمستخدم عندما يكون صوت جهازك المحمول مغلقًا. إذا كان النظام لا يستطيع أن يعرض قيمة جلوكوز، فإنه لا يستطيع أيضًا أن يقدم تنبيهات خاصة بالجلوكوز. إذا كنت لا تستطيع أن تشعر بالاهتزاز في جهاز الإرسال الذكي، فقد لا تلاحظ التنبيهات. يمكن أن يختلف الجلوكوز المحسوب في النظام قليلاً عن جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك. قد يتسبب هذا في تنشيط تنبيه في وقت مختلف عن وقت تنشيطه لو كانت قيم النظام مطابقة دائماً لقيم جهاز قياس الجلوكوز بالدم. إذا كنت لا تقيس الجلوكوز بالدم باستمرار وفاتك أحد التنبيهات، فقد لا تعرف بارتفاع مستويات الجلوكوز أو انخفاضها. قد تحتاج إلى عناية طبية في حالة تعرضك لارتفاع الجلوكوز أو انخفاضه دون أن تدرك ذلك.

إذا لم تقم بقياس الجلوكوز لديك باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم عندما تصيبك أعراض انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم أو ارتفاعه أو عندما لا تتسق الأعراض لديك مع قراءات مستشعر الجلوكوز، فقد تفتك حالة ارتفاع في الجلوكوز أو انخفاضه. قد تؤدي قرارات العلاج التي يتم اتخاذها من دون التأكد بواسطة فحص بجهاز قياس الجلوكوز بالدم إلى حدوث جلوكوز مرتفع أو منخفض بما أن قيم الجلوكوز بالدم يمكن أن تختلف قليلاً عن قيم مستشعر الجلوكوز التي تم قياسها في السائل الخلالي.

يتم إدخال المستشعر عن طريق عمل شق صغير ووضعه تحت الجلد. قد يتسبب الغرس في عدوى، أو ألم، أو تهيج الجلد، أو كدمة، أو تغير لون الجلد أو الضمور. تم الإبلاغ عن حالات دوار وإغماء وغثيان في عدد قليل أثناء الدراسات السريرية، وكانت هناك حالات لكسر المستشعر أو عدم إزالته في المحاولة الأولى. بالإضافة إلى أن اللاصق قد يحدث تفاعلاً أو تهيجاً في الجلد. يجب إبلاغ موفر الرعاية الصحية الخاص بك بأي مشكلة طبية ذات صلة بالإجراء أو استخدام الجهاز.

تحذيرات

- لم يتم اختبار نظام Eversense CGM باستخدام مواضع إدخال بخلاف أعلى الذراع.
- إذا شعرت في أي وقت بأعراض انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم أو ارتفاعه أو إذا كانت الأعراض لديك لا تتسق مع قراءات مستشعر الجلوكوز، ينبغي أن تختبر الجلوكوز لديك باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم.
- اختبر الجلوكوز لديك دائماً باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك قبل اتخاذ قرار في العلاج.
- إذا كان جهاز الإرسال الذكي لديك تالفاً أو مكسوراً، فلا تستخدمه لأن هذا يمكن أن يشكل خطراً على السلامة الكهربائية أو عطلاً ويمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية.

التحذيرات (تابع)

- قد تتعارض الملامسة القريبة مع التداخل الكهرومغناطيسي المباشر مع قدرة جهاز الإرسال الذكي على إرسال البيانات إلى جهازك المحمول. ابتعد عن مصدر التداخل الكهرومغناطيسي وتحقق من اتصال جهازك المحمول بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك.
- قد تقتل التتراسيكلينات قراءات مستشعر الجلوكوز بشكل زائف. اختبر الجلوكوز دائماً باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك إذا كنت تتناول التتراسيكلينات.
- قم دائماً بتغطية موضع الإدخال بضمادة معقمة قبل وضع لاصقة جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر إلى أن يتمائل للشفاء. حيث يمكن أن يؤدي عدم فعل ذلك إلى عدوى في موضع الإدخال.
- يرجى مراجعة دليل المستخدم هذا مع مزود رعايتك الصحية. لطرح المزيد من الأسئلة عن منتج Eversense XL واستكشاف مشاكله وإصلاحها، اتصل بالرقم المجاني لدعم العملاء في الولايات المتحدة على الرقم (844-736-7348). ومن خارج الولايات المتحدة، اتصل بموزعك المحلي أو قم بزيارة الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com/> لتحديد موقع موزعك المحلي.
- قم دائماً بمعايرة النظام باستخدام عينة دم بوخز الإصبع فقط. لا تستخدم قراءة جلوكوز الدم من موضع بديل (مثل المساعد أو راحة اليد) لمعايرة النظام.
- لا تقم بإدخال عدة حقن السوائل الخاصة بك ضمن نطاق 10.16 سم (4 بوصات) من موضع المستشعر. إذا كان موضع إعطاء الإنسولين يقع ضمن مسافة 10.16 سم (4 بوصات) من موضع المستشعر، فقد يتعارض مع قراءات مستشعر الجلوكوز ويمكن أن يسبب قراءات جلوكوز غير دقيقة.
- اتبع دائماً تعليمات مزود الرعاية الصحية الخاص بك للرعاية بعد إدخال المستشعر أو إخراجها. تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك إذا وقع أي من الأحداث التالية:
- قد تشعر بالألم أو احمرار أو انتفاخ في موضع (مواضع) الشق الجراحي بعد 5 أيام من إدخال المستشعر أو إزالته، أو في حال عدم التئام الشق في غضون 5 إلى 7 أيام.
- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه إحدى المواد المستخدمة في المستشعر أو جهاز الإرسال الذكي، والمدرجة ضمن المواصفات الفنية لدليل المستخدم هذا، فلا تستخدم نظام Eversense CGM.

تنبيهات

- جهاز الإرسال الذكي معدّ لاستخدام مريض واحد فقط. لا تتبادل أجهزة الإرسال الذكي مع شخص آخر. يمكن ربط كل جهاز إرسال ذكي بمستشعر واحد فقط كل مرة.
- قد تتسبب العلاجات أو الإجراءات الطبية التالية في تلف دائم للمستشعر وخاصة إذا تم استخدامها بالقرب من الجهاز:
 - تفتيت حصى الكلى - لا يوصى بإجراء تفتيت حصى الكلى لمن أدخل لهم مستشعر لأن الآثار غير معروفة.
 - العلاج بالإنفاذ الحراري - لا تستخدم الإنفاذ الحراري لمن أدخل لهم مستشعر. يمكن أن تنتقل طاقة العلاج بالإنفاذ الحراري عبر المستشعر وتتسبب في تلف بالأنسجة في منطقة الإدخال.
 - الكي بالكهرباء - قد يؤدي استخدام الكي بالكهرباء بالقرب من المستشعر إلى تلف في الجهاز. لا تستخدم الكي بالكهرباء بالقرب من المستشعر.
- لا ترتد جهاز الإرسال الذكي أثناء عمليات الفحص الطبي بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية المحوسبة (CT). لتجنب التأثير على النتائج، قم بفك جهاز الإرسال الذكي قبل التعرض لعمليات الفحص الطبي بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية المحوسبة. تأكد من أن مزود رعايتك الصحية يعرف عن جهاز الإرسال الذكي لديك.
- ينبغي الربط بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي في يوم الإدخال. يمكن أن يؤدي عدم ربط المستشعر مع جهاز الإرسال الذكي إلى تأخير في تلقي قراءات الجلوكوز.
- استخدام الستيرويد - لم يحدد ما إذا كانت المخاطر المرتبطة عادة بمادة أستيئات ديكساميثازون القابلة للحقن تسري على استخدام حلقة إفراز أستيئات ديكساميثازون هذه، وهي جهاز للإطلاق الموضعي تحت التحكم الشديد. يمكن أن تتسبب حلقة أستيئات ديكساميثازون في أحداث مناوئة أخرى غير مذكورة أو لم تظهر سابقاً.
- إذا كان هناك إحساس بالدفء في المستشعر أو جهاز الإرسال الذكي، فقم بفك جهاز الإرسال الذكي فوراً وتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المزيد من النصائح. يمكن أن يعني دفء المستشعر وجود عدوى أو عطل في المستشعر.
- قم بفك جهاز الإرسال الذكي من ذراعك قبل شحن بطاريته. يمكن أن يؤدي عدم فك جهاز الإرسال الذكي أثناء شحنه إلى صدمة كهربائية.

التنبيهات (تابع)

- لا تحاول استخدام تطبيق Eversense XL App أثناء تشغيل سيارة.
- ينبغي ألا تتلقى علاجًا بالتدليك بالقرب من موضع إدخال المستشعر. يمكن أن يؤدي العلاج بالتدليك بالقرب من موضع المستشعر إلى إحساس بعدم الراحة أو تهيج في الجلد.
- لا تستخدم إلا مهايئ طاقة التيار المتردد وكابل USB المرفقين مع جهاز الإرسال الذكي، عند شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر إلى إتلاف جهاز الإرسال الذكي مما يمنع استقبال قراءات الجلوكوز بالشكل الصحيح، واحتمالية حدوث حرق، مما قد يؤدي إلى إلغاء الضمان. في حالة تلف مهايئ طاقة التيار المتردد أو كابل USB بجهاز Eversense أو فقد أي منهما، اتصل بفريق دعم العملاء للاستبدال وضمان تشغيل الجهاز بأمان.
- إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن رد الفعل التحسسي لمواد السيليكون، فتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك قبل الاستخدام.
- تخلص من الرقعة بعد 24 ساعة من الاستخدام.
- تطبيق المراقبة عن بُعد Eversense NOW لا يحل محل نظام المراقبة حسب توجيه مزود الرعاية الصحية الخاص بك.
- لم يتم اختبار نظام Eversense XL CGM على الفئات التالية: الحوامل أو المرضعات، ومن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمصابون بمرض حرج أو المقيمون في المستشفى، ومن يتلقون علاجًا كابتًا للمناعة أو علاجًا كيميائيًا أو علاجًا مضادًا لتخثر الدم، ومن لديهم جهاز مزروع نشط آخر، مثل مزيل الرجفان القابل للزرع (يسمح بالأجهزة المزروعة الخاملة مثل دعامات القلب)، والمصابون بأنواع حساسية معروفة أو يستخدمون كورتكويدات سكرية (باستثناء الأنواع الموضعية أو البصرية أو الأنفية، لكن من دون استثناء الأنواع المستنشقة).
- تعتبر ساعة Apple Watch شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense XL CGM وينبغي عدم استخدامها بدلاً من شاشة Eversense XL CGM الرئيسية.

يصف هذا القسم خطوات بدء التشغيل الأولية المطلوبة قبل أن تتمكن من البدء في استخدام نظام Eversense XL CGM الجديد الخاص بك بشكل يومي. يمكنك إجراء هذه الخطوات قبل أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك بإدخال المستشعر.

لتبدأ، تحتاج إلى ما يلي:

- جهازك المحمول لتنزيل تطبيق Eversense XL App.
 - اتصال إنترنت لاسلكي.
 - عبوة جهاز إرسال Eversense XL الذكي هذه التي تتضمن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك ومصدر الإمداد بالطاقة.
- ملاحظة:** إذا لم تتلق عبوة جهاز الإرسال الذكي الخاصة بك، فانتقل إلى التعليمات المتعلقة بتنزيل تطبيق Eversense XL App وتنبيته على جهازك المحمول لاحقاً في هذا القسم.
- يمكنك إكمال خطوات بدء التشغيل التالية قبل إدخال مستشعرك لكي تتمكن من التعرف على النظام.

ملاحظة: يتم ضبط جهاز الإرسال الذكي الخاص بك على حالة "السبات" قبل شحنه. عندما تشحن جهاز الإرسال الذكي لأول مرة، تتغير الحالة إلى الحالة النشطة.

خطواتان سهلتان لبدء التشغيل:

1. قم بتنزيل تطبيق Eversense XL App إلى جهازك المحمول.
 2. قم بإعداد التطبيق - إنشاء الحساب والإقران والإعدادات.
- بعد أن تتلقى جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، يجب أن يكون مشحوناً بشكل كامل قبل الإقران مع التطبيق.

شحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك


3

من المهم أن تشحن بطارية جهاز الإرسال الذكي يومياً لضمان جمع البيانات من المستشعر وإرسالها إلى التطبيق. لا يجمع جهاز الإرسال الذكي المعلومات من المستشعر أو يرسلها إلى التطبيق أثناء الشحن. يمكنك أيضاً أن تشحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك عن طريق توصيل كابل USB بمنفذ USB في جهاز كمبيوتر بدلاً من مهائئ طاقة التيار المتردد. قد يستغرق استخدام جهاز كمبيوتر وقتاً أطول للشحن الكامل لبطارية جهاز الإرسال الذكي.



تنبيه: لا تستخدم إلا مهائئ طاقة التيار المتردد وكابل USB المرفقين مع جهاز الإرسال الذكي، عند شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر إلى إتلاف جهاز الإرسال الذكي مما يمنع استقبال قراءات الجلوكوز بالشكل الصحيح، واحتمالية حدوث حريق، مما قد يؤدي إلى إلغاء الضمان. في حالة تلف مهائئ طاقة التيار المتردد أو كابل USB بجهاز Eversense أو فقد أي منهما، اتصل بفريق دعم العملاء للاستبدال وضمان تشغيل الجهاز بأمان.

2. قم بتوصيل الطرف الصغير من كابل USB بحامل الشحن في منفذ USB.

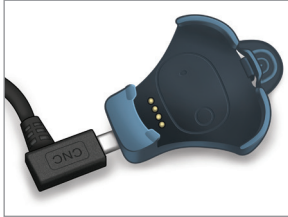

1. قم بتوصيل الطرف القياسي من كابل USB بالمهائئ في منفذ USB.




3. قم بمحاذاة الدبابيس الذهبية الأربعة في الجزء السفلي من جهاز الإرسال الذكي مع الدبابيس الذهبية الأربعة في حامل الشحن.

- أزح جهاز الإرسال الذكي إلى مكانه في حامل الشحن.
- بمجرد أن يكون جهاز الإرسال الذكي في موضعه، اضغط عليه للأسفل إلى أن يثبت في مكانه.



4. قم بتوصيل المهاي بمنفذ التيار المتردد.

- لتحرير جهاز الإرسال الذكي من حامل الشحن، اسحب اللسان وارفع جهاز الإرسال الذكي من الحامل.

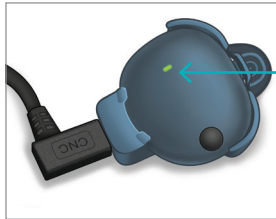

مؤشر مصباح LED
(يضيء باللون
الأخضر أو البرتقالي)

الخطوة 1. تنزيل التطبيق وتثبيته

3

تم تصميم التطبيق ليعمل مع جهاز الإرسال الذكي ليتلقى بيانات مستشعر الجلوكوز ويعرضها تلقائيًا.

1. حدد الجهاز المحمول الذي ترغب في استخدامه لعرض قراءات الجلوكوز الخاصة بك. في معظم الحالات، سيكون هذا الجهاز هاتفًا ذكيًا.



2. قم بتنزيل تطبيق Eversense XL المجاني من متجر تطبيقات Apple App Store أو من Google Play. ستختلف التنبيهات الخاصة بتنشيط التطبيق بين نظامي التشغيل Android و iOS.



رمز تطبيق Eversense XL App

ملاحظة: تأكد من أن جهازك المحمول يستخدم أحدث نظام تشغيل.

3. على شاشة التثبيت، اضغط على Install application واتبع تعليمات التثبيت.

بعد دقيقة أو دقيقتين، تأكد من أن الجهاز المحمول يظهر أيقونة تطبيق Eversense XL App (كما هو موضح جهة اليمين).

مهم: تأكد من أن لديك اتصال إنترنت لاسلكي وأنه تم تشغيل تقنية Bluetooth قبل المتابعة.

الخطوة 2. قم بإعداد التطبيق - إنشاء الحساب والإقران والإعدادات

3

بمجرد تنزيل التطبيق، قم بتوصيل التطبيق بجهاز الإرسال الذكي عن طريق إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول.



2. بعد أن تقبل الاتفاقية، ستتم مطالبتك بإنشاء حساب وتسجيله باستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- يجب أن تسجل حسابًا قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول. اضغط على **Create an Account**.

ملاحظة: إذا نسيت كلمة مرورك، يمكنك إعادة تعيينها عبر التطبيق. إذا نسيت بريدك الإلكتروني المرتبط بحسابك، فاتصل بدعم العملاء.


1. ابدأ تشغيل التطبيق عن طريق الضغط على أيقونة تطبيق Eversense XL App في جهازك المحمول. تظهر الصيغة الكاملة من اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي. اطع عليها واقبلها. تظهر بعد ذلك نظرة عامة على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.
- قم بالتأكد واضغط على **Accept**.

3. أدخل معلومات حسابك ثم اضغط على Register.


4. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك واضغط على LOG IN. سترى شاشة تأكيد. اضغط على OK. ملاحظة: كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف.

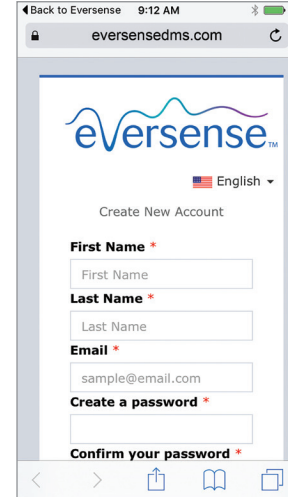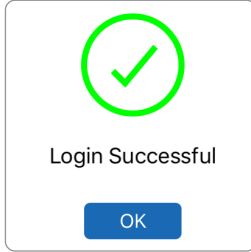

5. عندما تكمل التسجيل وتسجل الدخول، تظهر شاشة WELCOME.

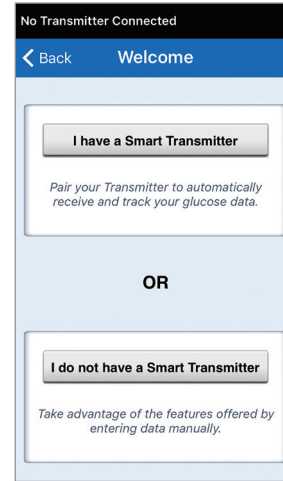


6. اختر خيارًا من اثنين على حسب ما إذا كان لديك جهاز الإرسال الذكي الخاص بك بالفعل أم لا:

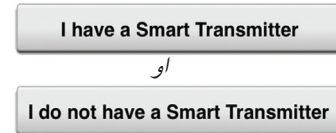


(انتقل إلى الخطوة 12).

يجب على مستخدمى Android فقط تفعيل خدمات الموقع.


- اضغط على OK لإعطاء الإذن لخدمات الموقع لأن اتصال البلوتوث مطلوب.

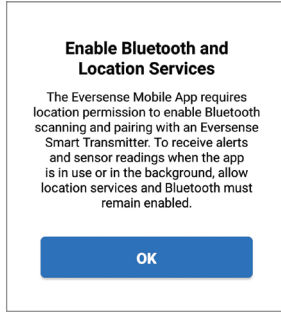

- ثم اضغط على Allow للحصول على الإشعارات في أثناء استخدام التطبيق أو تشغيله في الخلفية.

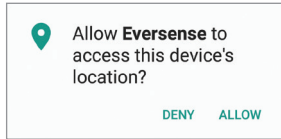

ملاحظة: قد يرى نظام تشغيل Android 12 فما فوق ظهور طلب إذن مختلف.

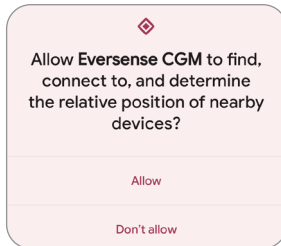

9. تظهر شاشة BLUETOOTH PAIRING REQUEST منبثقة.

اضغط على **Pair** لتكمل عملية الإقران.

ملاحظة: لا يمكن إقران جهاز الإرسال الذكي إلا مع جهاز محمول واحد كل مرة.

Bluetooth Pairing Request

"T000119" would like to pair with your iPod touch.


Cancel

Pair

8. في شاشة PAIR YOUR

TRANSMITTER يظهر معرف جهاز الإرسال الذكي الذي اكتشفه التطبيق باعتباره "Not Connected". (يتطابق معرف جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع الرقم التسلسلي الموجود على الجانب الخلفي من جهاز الإرسال الذكي).

اضغط على **Not Connected** لتبدأ تشغيل عملية الإقران.

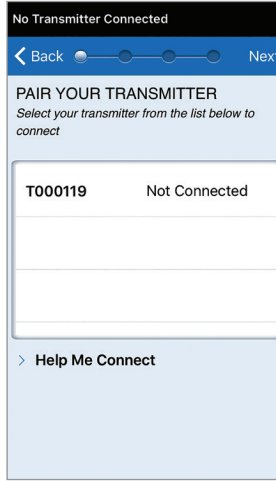

7. أثناء تشغيل جهاز الإرسال الذكي،

وعندما تظهر شاشة **PAIR YOUR TRANSMITTER** على جهازك المحمول، اضبط جهاز الإرسال الذكي الخاص بك على الوضع "Discoverable" ليعثر الجهاز المحمول على جهاز الإرسال الذكي:

- اضغط على زر تشغيل جهاز الإرسال الذكي ثلاث مرات. تأكد من أن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك ليس متصلاً بمصدر الطاقة.


- سيومض مصباح LED باللون الأخضر والبرتقالي ليشير إلى أن جهاز الإرسال الذكي في الوضع Discoverable.




زر الطاقة

ملاحظة: إذا ضغطت على زر الطاقة بجهاز الإرسال الذكي ولم يظهر ضوء مصباح LED، فاضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ تقريباً لتشغيله.


10. تظهر كلمة «Connected» بجوار معرف جهاز الإرسال الذكي بمجرد اكتمال الإقران. سيقدم جهاز الإرسال الذكي اهتزازات متقطعة إلى أن يرتبط جهاز الإرسال الذكي مع المستشعر الذي تم إدخاله (انظر إدخال المستشعر وربطه).
- اضغط على **Next**.

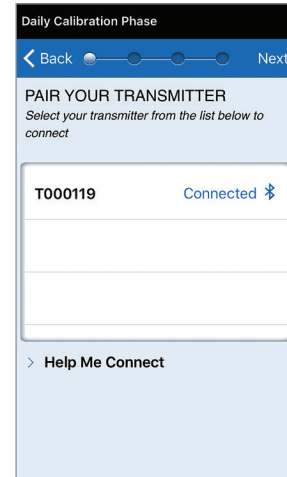

11. تظهر شاشة **The DAILY CALIBRATION** لكي تضبط منها أوقات تذكيرك الصباحية والمسائية لعمليات المعايرة التي ستقوم بها مرتين يوميًا. ستتلقى إشعارًا تلقائيًا عندما يحين وقت إدخال معايرة.
- اضغط على **Morning** لتغير الوقت وكرر الأمر مع **Evening**.
 - اضغط على **Next** عندما تنتهي.

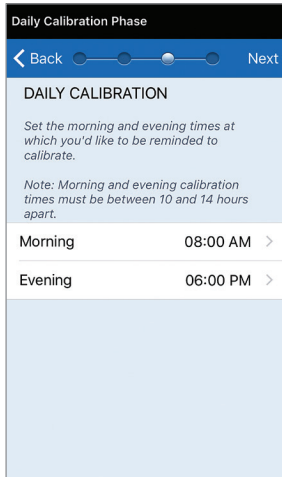

13. بعد ذلك، تظهر شاشة MY GLUCOSE. لن تحتوي الشاشة على أي بيانات عن الجلوكوز لعرضها في هذا الوقت.

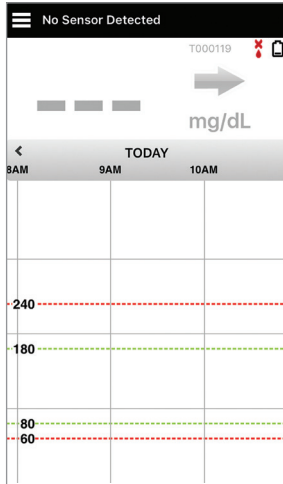

ملاحظة: بمجرد أن يرتبط المستشعر بجهاز الإرسال الذكي، ستحتفي نقطة الدم الحمراء التي عليها علامة X وستظهر نقطة دم سوداء بعلامات إشارة.

بمجرد أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك بإدخال المستشعر واكتمال مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة، يمكنك أن تبدأ المعايير. إذا لم يتم حتى الآن إدخال المستشعر الخاص بك، فيمكنك مراجعة دليل المستخدم هذا لتتعرف على التطبيق وميزاته.

12. تظهر شاشة UNIT OF MEASUREMENT وتعرض وحدة القياس المعيارية في منطقتك. ستظهر قراءات الجلوكوز الخاصة بك دائماً بوحدة القياس هذه.

ملاحظة: لا تغيّر وحدة القياس إلا إذا ناقشت الأمر مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك. عند تأكيد وحدة القياس، اضغط على **Finish**.

4. إدخال المستشعر وربطه

4

يصف هذا القسم كيفية ربط المستشعر بجهاز الإرسال الذكي بعد أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك بإدخال المستشعر. يستطيع مزود الرعاية الصحية الخاص بك فقط إدخال المستشعر. انظر قسم "معلومات عن المستشعر" لمعرفة المزيد.


إذا كان قد تم إرسال جهاز الإرسال الذكي إليك مباشرة، فاحرص على إحضاره مع جهازك المحمول إلى جلسة الإدخال. بمجرد أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك بإدخال مستشعرك، يجب ربط جهاز الإرسال الذكي والمستشعر لكي تبدأ مرحلة الإحماء. يمكن ربط جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع مستشعر واحد فقط في كل مرة.

2. انتقل من صفحة Placement Guide إلى شاشة Main Menu بمجرد أن تتأكد من وجود إشارة.

ملاحظة: الاتصال بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي حساس لاتجاه جهاز الإرسال. إذا كان جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر مباشرة وأشار دليل الوضع إلى عدم وجود اتصال، فحاول تدوير جهاز الإرسال الذكي قليلاً إلى اليسار أو اليمين بحيث تكون أيقونة الطاقة ومصباح LED متوازنين مع المستشعر.


مؤشر مصباح LED
(بضيء باللون الأخضر
أو البرتقالي)

زر الطاقة

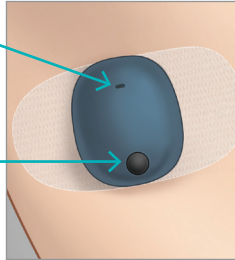

1. تأكد من تشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك (انظر استخدام جهاز الإرسال الذكي) وأن يكون جهازك المحمول متصلاً بالإنترنت.

- ضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر الذي تم إدخاله مباشرة إلى أن يظهر اتصال على **Placement Guide** في التطبيق. صفحة **Placement Guide < Menu** موجودة في

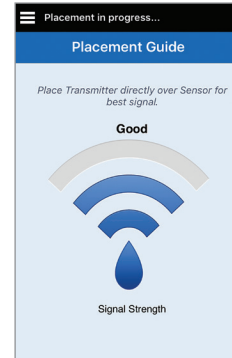

4. ستبدأ عملية الربط. ستظهر إلى جانب كل خطوة علامة اختيار عندما تنتهي. قد يستغرق اكتمال العملية مدة تصل إلى 10 دقائق. لا تنزع جهاز الإرسال الذكي من موضع الإدخال لديك قبل أن تظهر علامة الاختيار الثالثة.

Warm Up Phase (< 24 hours remaining)	
Linked Sensor	Done
Linked Sensor	7373
Detected Sensor	7373
1. Retrieving Parameters	✓
2. Linking sensor: 7373	✓
3. Linking process complete	✓


Place the transmitter over the sensor to complete linking. Press OK when done.

OK


إذا تم نزع جهاز الإرسال الذكي من موضع المستشعر، فسيعرض النظام إشعارًا.


تنبيه: ينبغي الربط بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي في يوم إدخال المستشعر. يمكن أن يؤدي عدم ربط المستشعر مع جهاز الإرسال الذكي إلى تأخير في تلقي قراءات الجلوكوز.

3. لربط جهاز الإرسال الذكي مع المستشعر، اضغط على **Link Sensor** على شاشة **New Sensor Detected** المنبثقة أو عن طريق الضغط على **Menu > Settings > System > Linked Sensor > Link** ثم اضغط على **Link Detected Sensor**.

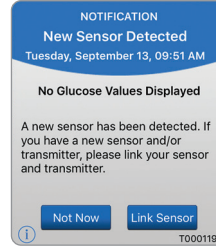

ملاحظة: قد يستغرق ظهور إشعار اكتشاف مستشعر جديد «New Sensor Detected» مدة تصل إلى 5 دقائق.

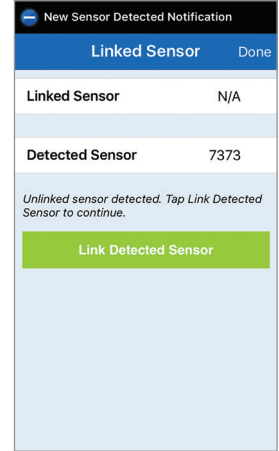

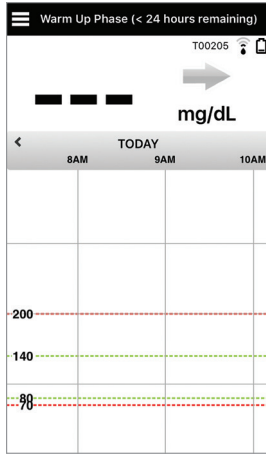

ملاحظة: يحتاج المستشعر إلى مرحلة إحماء لمدة 24 ساعة ليستقر في جسدك قبل أن يقوم جهاز الإرسال الذكي بجمع قيم الجلوكوز. أثناء مرحلة الإحماء، لا تحتاج إلى ارتداء جهاز الإرسال الذكي. إذا قررت ارتداء جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر في هذا الوقت، فستلقى رسالة على التطبيق تبين أن مرحلة الإحماء جارية. بمجرد اكتمال مرحلة الإحماء، ابدأ تشغيل جهاز الإرسال الذكي وضعه فوق المستشعر باستخدام رقعة Eversense اللاصقة. سيطلب منك النظام إجراء المعايرة باستخدام التطبيق.

مهم: إذا لم يتم تشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك وإقرانه مع تطبيق Eversense XL App وربطه بالمستشعر، فلن يتمكن النظام من مطالبتك بإجراء المعايرة.

5. استخدام جهاز الإرسال الذكي

يصف هذا القسم الميزات العديدة لجهاز الإرسال الذكي وكيفية الحصول على مراقبة متواصلة دون انقطاع لمستويات الجلوكوز.

يتصل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع كل من المستشعر والتطبيق ليقدّم معلومات مراقبة الجلوكوز المستمرة. يقوم جهاز إرسال Eversense XL الذكي الخاص بك بما يلي:

- يشغّل المستشعر.

- يحسب بيانات الجلوكوز ويخزنها.

- يقدم تنبيهات مذبذبة على الجسم عندما تصل إلى مستويات تنبيه الجلوكوز التي حددتها.

- يرسل بيانات الجلوكوز إلى التطبيق عبر تقنية Bluetooth.


- يمكن إعادة شحنه باستخدام حامل الشحن.

- منفذ USB لتنزيل البيانات إلى التطبيقات الخارجية المتوافقة.

- مصباح LED متعدد الألوان يشير إلى الأوضاع المتعددة لجهاز الإرسال الذكي.

- يتصل بالجهاز المحمول.

- يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله.

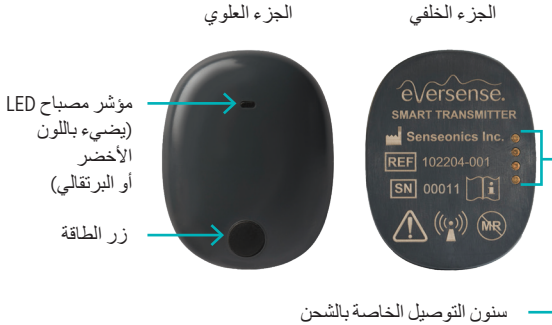

الاستخدام اليومي

5

تلقي قراءات الجلوكوز المستمرة والمعلومات، تذكر ما يلي عند استخدام جهاز الإرسال الذكي الخاص بك:

- ✓ قم بارتداء جهاز الإرسال الذكي الخاص بك دائماً باستثناء وقت الشحن.
- ✓ جهاز الإرسال الذكي مقاوم للماء حتى عمق متر واحد (3.2 أقدام) لمدة 30 دقيقة. سيؤدي تعريض جهاز الإرسال الذكي لظروف بخلاف هذه إلى التلف وإلغاء ضمانك.
- ✓ احرص على أن يحتوي جهاز الإرسال الذكي على ما يكفي من طاقة البطارية طيلة الوقت.
- ✓ قم بإجراء اختباري معايرة على جهاز قياس الجلوكوز بالدم كل يوم عندما يُطلب منك ذلك.
- ✓ عليك الاهتمام بالتنبيهات والإشعارات التي تتلقاها من جهاز الإرسال الذكي الخاص بك وجهازك المحمول.
- ✓ أرجع جهاز الإرسال الذكي لمكانه باستخدام رقعة لاصقة جديدة كل يوم.
- ✓ يمكنك إزالة جهاز الإرسال الذكي من أعلى الذراع في أي وقت إلا أثناء المعايرة. تذكر أنه لا يتم جمع أي بيانات إذا لم يكن جهاز الإرسال الذكي متصلاً بالمستشعر. عندما تعيد جهاز الإرسال الذكي إلى موضع المستشعر، ستستغرق إعادة اتصال المستشعر وقراءات الجلوكوز حوالي 10 دقائق لتظهر في التطبيق.
- ✓ عندما لا يكون جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول ضمن نطاق بعضهما البعض، يتم تخزين أي بيانات جمعها جهاز الإرسال الذكي وإرسالها إلى التطبيق عندما يعود الجهاز المحمول وجهاز الإرسال الذكي إلى النطاق مرة أخرى.
- ✓ من الآمن بالنسبة لك أن ترتدي المستشعر وجهاز الإرسال الذكي أثناء مرورك عبر أجهزة كشف المعادن في المطارات. أثناء الطيران، يعمل جهاز الإرسال الذكي مثل أي جهاز آخر بتقنية Bluetooth. احرص على اتباع إرشادات السلامة المحددة التي تفرضها شركة الطيران.

تحذير: إذا كان جهاز الإرسال الذكي لديك تالفاً أو مكسوراً، فلا تستخدمه لأن هذا يمكن أن يشكل خطراً على السلامة الكهربائية أو عطلاً ويمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية.

تنبيه: قم دائماً بترك جهاز الإرسال الذكي من جسمك قبل شحن البطارية.

تنبيت جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر الذي تم إدخاله


يجب تنبيت جهاز الإرسال الذكي على الجلد فوق المستشعر مباشرة باستخدام الرقعة اللاصقة التي تُستخدم مرة واحدة. تم تصميم كل رقعة لاصقة بحيث يتم تبديلها يوميًا كما أن لها جانب لاصق يلتصق بالجانب الخلفي في جهاز الإرسال الذكي وجانب لاصق من السيليكون يلتصق بالجلد. ينبغي أن يكون كل من سطح الجلد وجهاز الإرسال الذكي نظيفين وجافين لتنبيت اللصقين بالرقعة.

ملاحظة: ستحصل على الرقعات اللاصقة من مزود الرعاية الصحية الخاص بك.

تنبيه: إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن رد الفعل التحسسي لمواد السيليكون، فتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك قبل الاستخدام. تخلص من الرقعة بعد 24 ساعة من الاستخدام.

2. ضع جهاز الإرسال الذكي فوق الجانب اللاصق (في الوسط) من الرقعة واضغط بحزم للتنبيت.

- ينبغي وضع جهاز الإرسال الذكي بحيث يتجه جانبه إلى جناحي الرقعة (كما يظهر).

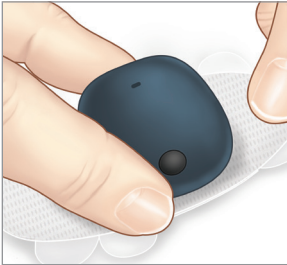


1. انزع الغلاف الورقي الذي يظهر عليه رسم جهاز إرسال Eversense XL الذكي. حاول ألا تلمس الجزء اللاصق في الرقعة من الوسط.




3. انزع الغلاف الخلفي الشفاف الكبير وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر مباشرة.

- للحصول على شدة الإشارة المثلى، يجب وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر مباشرة. يمكن أيضًا تحسين شدة الإشارة عن طريق تدوير جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر بحيث يكون المستشعر بمحاذاة جهاز الإرسال الذكي.

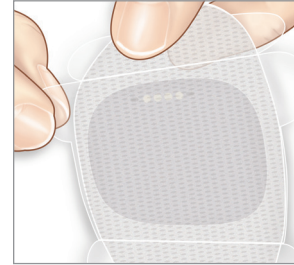


4. تحقق من الاتصال بين جهاز الإرسال الذكي والمستشعر.

- اضغط على **Menu > Placement Guide**.
- راجع **Placement Guide** عند وصل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك لتضمن وجود اتصال ما بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي.

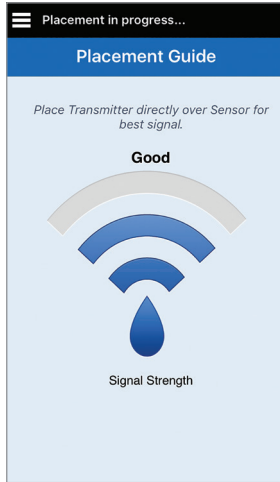


5. اضغط الرقعة اللاصقة بحزم على سطح الجلد فوق المستشعر.

- ينبغي وضع جهاز الإرسال الذكي بحيث يستقر جناحا الرقعة على الذراع أفقيًا.

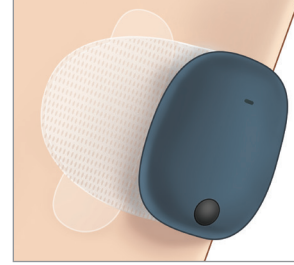

6. استخدم اللسان لسحب البطانة الشفافة المتبقية.

- تأكد من أن اللاصق أملتسًا على الجلد. تأكد من أن الرقعة مستوية على سطح الجلد.

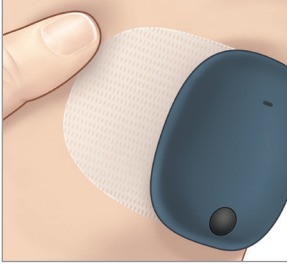

تشغيل جهاز الإرسال الذكي وإيقاف تشغيله

يتضمن جهاز الإرسال الذكي زر الطاقة لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. يُستخدم زر الطاقة ومصابيح بصمام ثنائي باعث للضوء (LED) للإشارة إلى الطاقة المتبقية في البطارية.

1. لتشغيل جهاز الإرسال الذكي، اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا.

- سيصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبية مرة واحدة.
 - حرر زر الطاقة وسيومض مصباح LED مرة واحدة بحيث يشير إلى تشغيل الجهاز.
- يمكنك الضغط على زر الطاقة مرة واحدة في أي وقت لترى ما إذا كان جهاز الإرسال الذكي يعمل. إذا ظهر مصباح LED، فهذا يعني أن جهاز الإرسال الذكي يعمل. إذا لم يظهر مصباح LED، فهذا يعني أن جهاز الإرسال الذكي لا يعمل.



2. لإيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي، اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا.

- سيصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبية مرة واحدة.
- حرر زر الطاقة وسيومض الزر باللون البرتقالي مرة واحدة، بحيث يشير إلى إيقاف التشغيل.

العناية بجهاز الإرسال الذكي وصيانتة

- حافظ على نظافة جهاز الإرسال الذكي وحامل الشحن (خاليان من الغبار الظاهر) وحمايتهما عندما لا يكونان قيد الاستخدام. امسح الجزء الخارجي بقطعة قماش بين الاستخدامات للحفاظ على النظافة.
- اشحن جهاز الإرسال الذكي عندما تكون طاقة البطارية منخفضة.
- لا تستخدم إلا مصدر الطاقة المتوفر مع نظامك لشحن بطارية جهاز الإرسال الذكي. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة غير الذي تزوده شركة Senseonics إلى إلغاء ضمان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك. لا تستخدم مصدر الطاقة إذا كان تالفاً بأي شكل.
- لتنظيف جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، امسحه بقطعة قماش مبللة بالماء؛ وتخلص من قطعة القماش وفقاً للوائح المحلية لديك. تخلص من جهاز الإرسال الذكي وكل مكونات النظام الأخرى وفقاً للوائح المحلية.

مؤشر البطارية

يمكن فحص طاقة بطارية جهاز الإرسال الذكي باستخدام التطبيق أو على جهاز الإرسال الذكي نفسه.

باستخدام التطبيق:

- اضغط على **Menu > About > My Transmitter**. قم بالتمرير لأسفل إلى خط مستوى شحن البطارية الذي يبين مقدار الشحن المتبقي في البطارية.
- أو
- افحص أيقونة البطارية في الركن العلوي الأيمن على شاشة **MY GLUCOSE**. تشير أيقونة البطارية الحمراء إلى أن بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة.

باستخدام جهاز الإرسال الذكي:

- أثناء تشغيل جهاز الإرسال الذكي، اضغط على زر الطاقة وحرره. سيومض مصباح LED باللون الأخضر مرة واحدة إذا كانت البطارية تحتوي على طاقة لا تقل عن 10%. يوصى بأن تشحن جهاز الإرسال الذكي دائماً لمدة 15 دقيقة كاملة باستخدام منفذ كهرباء في الحائط لتضمن شحنًا كاملاً. انظر الصفحة التالية للاطلاع على المزيد من المعلومات عن مؤشرات مصباح LED.

مؤشرات LED للحالة

يبلغ جهاز الإرسال الذكي عن عدة حالات مختلفة بناءً على لون مصباح LED.

• أثناء استخدام جهاز الإرسال الذكي:

الإجراء	الحالة	حالة مصباح LED
إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهاز محمول	الوضع القابل للاكتشاف	أخضر وبرتقالي بالتبادل عند الضغط على زر الطاقة 3 مرات خلال 5 ثوانٍ
اضغط على زر الطاقة باستمرار لمدة 5 ثوانٍ لتشغيله	جهاز الإرسال الذكي لا يعمل	لا يومض عند الضغط على زر الطاقة
لا حاجة إلى إجراء فوري	طاقة البطارية 10% - 90%	يومض باللون الأخضر (مرة واحدة) عند الضغط على زر الطاقة
اشحن البطارية قريبًا	شحن البطارية منخفض، تبقى أقل من 10% من شحن البطارية	يومض باللون البرتقالي (مرة واحدة) عند الضغط على زر الطاقة
راجع التطبيق على جهازك المحمول لفهم التنبيه	تم إطلاق تنبيه	مصباح LED بلون برتقالي لمدة دقيقة واحدة

• أثناء شحن جهاز الإرسال الذكي:

الإجراء	حالة البطارية	حالة مصباح LED
اشحن لمدة 15 دقيقة قبل الفصل من مصدر الطاقة	مشحون بنسبة 0% - 65%	يضيئ بلون برتقالي ثابت أو يومض باللون البرتقالي عند التوصيل بكابل USB
اشحن لمدة 15 دقيقة قبل الفصل من مصدر الطاقة	مشحون بنسبة 65% - 100%	لون أخضر ثابت عند التوصيل بكابل USB

6. معايرة النظام

يصف هذا القسم إجراء المعايرة وجدول المعايرة الزمني لنظام **Eversense XL CGM** الخاص بك.

لضمان الحصول على أفضل أداء، يجب إجراء معايرة روتينية باستخدام قراءات وخز الإصبع من جهاز قياس الجلوكوز بالدم. لا تستخدم مواقع اختبار بديلة مثل ساعدك عند إدخال قيم جلوكوز الدم للمعايرة. يمكن استخدام أي جهاز قياس متاح تجاريًا لإجراء المعايرة. بمجرد إدخال مستشعرك وربطه بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك، يبدأ النظام في مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة. المعايرة ليست مطلوبة أثناء هذه المرحلة.

هناك مرحلتان للمعايرة:

مرحلة بدء التهيئة - بعد مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة، يجب إكمال 4 اختبارات معايرة بوخز الإصبع، على أن تكون على فترات تتراوح ما بين ساعتين إلى 12 ساعة.

مرحلة المعايرة اليومية - بعد مرحلة التهيئة، يجب أن تكمل اختبارين للمعايرة بوخز الإصبع بفارق زمني بينهما يتراوح بين 10 ساعات و14 ساعة.

المعايرة الروتينية مهمة جدًا لضمان الحصول على أفضل أداء من نظام Eversense XL CGM. يمكن أن تساعدك النصائح التالية على تحسين مقاييس معاييرك:

نصائح لضمان معايرة جيدة:

- ✓ قم بالمعايرة في أوقات لا يتغير فيها الجلوكوز بسرعة (مثل قبل الوجبات، قبل أخذ جرعة الأنسولين).
- ✓ قم بالمعايرة عندما تكون متأكدًا أنك لن تطلع جهاز الإرسال الذكي أثناء الخمس عشرة دقيقة القادمة.
- ✓ اغسل يديك بماء دافئ بالصابون وجففهما جيدًا قبل أن تأخذ قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم.
- من المهم جدًا أن تكون يداك نظيفتين وجافتين عندما تفحص الجلوكوز في دمك.
- ✓ اتبع دائمًا تعليمات الشركة منتجة جهاز قياس الجلوكوز بالدم لتحصل على قراءات دقيقة للجلوكوز بالدم لإجراء المعايرة.
- ✓ تأكد من أن الرمز الموجود على قارورة شريط الاختبار يطابق الرمز الموجود على جهاز قياس الجلوكوز بالدم لديك (إذا كان الترميز مطلوبًا).

المعايرة لن تكتمل أو النتائج لن تكون مقبولة إذا:

- ✗ كانت قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم أقل من 40 mg/dL.
- ✗ كانت قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم أكبر من 400 mg/dL.
- ✗ تم أخذ قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم أكثر من 10 دقائق قبل إدخال النتيجة في تطبيق Eversense XL App.
- ✗ كانت قراءة مستشعر الجلوكوز مختلفة جدًا عن قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم.
- ✗ كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك قيد الشحن أثناء الخمس عشرة دقيقة التالية لإدخال قيمة المعايرة الخاصة بك.

مراحل المعايرة

أ. مرحلة التهيئة (بعد مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة)

- أثناء هذه المرحلة، يجب إجراء 4 اختبارات بمقياس جلوكوز الدم بوخز الأصبع.
- يجب أن يتراوح الفارق الزمني بين اختبارات المعايرة الأربعة بين ساعتين و12 ساعة ويجب إكمال الاختبارات الأربعة كلها خلال فترة 36 ساعة.
- المعايرة الأولى = بعد 24 ساعة من إدخال المستشعر.
- المعايرة الثانية = ساعتين حتى 12 ساعة بعد نجاح المعايرة الأولى.
- المعايرة الثالثة = ساعتين حتى 12 ساعة بعد نجاح المعايرة الثانية.
- المعايرة الرابعة = ساعتين حتى 12 ساعة بعد نجاح المعايرة الثالثة.
- ستبدأ قراءات الجلوكوز في الظهور في التطبيق بعد دقائق قليلة من اكتمال المعايرة الثانية بنجاح.

مهم: إذا لم يتم تشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك وإقرانه مع تطبيق Eversense XL App والمستشعر، فلن يتمكن النظام من مطالبتك بإجراء المعايرة.

إعادة الدخول في مرحلة التهيئة

- سيؤدي ما يلي إلى أن يعيد النظام الدخول في مرحلة التهيئة.
- عدم إكمال اختبار معايرة خلال مدة 12 ساعة أثناء مرحلة التهيئة.
- عدم إكمال كل اختبارات المعايرة الأربعة خلال 36 ساعة أثناء مرحلة التهيئة.
- عدم إجراء اختباري معايرة خلال مدة 24 ساعة أثناء مرحلة المعايرة اليومية (انظر ب. مرحلة المعايرة اليومية).
- إذا اختلفت آخر عدة قياسات باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم بشدة عن قيم مستشعر الجلوكوز.
- إذا كان شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي قد نفذ منذ أكثر من 16 ساعة.
- عندما تتلقى تنبيه فحص المستشعر.
- بعد ست ساعات من تلقّيك لتنبيه Sensor Suspend.

ب. مرحلة المعايرة اليومية

تتطلب مرحلة المعايرة اليومية اختبارين بمقياس الجلوكوز بالدم في أوقات المعايرة المحددة صباحًا ومساءً. ستبدأ مرحلة المعايرة اليومية الأولى بعد اكتمال مرحلة التهيئة بنجاح.

- سيبلغك النظام تلقائيًا عندما يحين الوقت لإجراء اختبار المعايرة مرتين يوميًا.
- يجب أن يتراوح الفاصل الزمني بين أوقات المعايرة اليومية بين 10 ساعات و14 ساعة.
- يتيح النظام إمكانية إجراء اختبار المعايرة **قبل** مدة تصل إلى ساعتين من الوقت المحدد. إذا فاتك الوقت المحدد للمعايرة، فسينبهك النظام كل ساعة.
- تبين شاشة **CALIBRATE** وقت المعايرة التالي المسموح به.


ملاحظة: إذا فات موعد اختبار المعايرة اليومية، فلن تظهر قراءات مراقبة الجلوكوز المستمرة بعد مرور 16 ساعة منذ آخر نتيجة معايرة مقبولة. إذا لم يتم إدخال نتيجة أحد اختبارات المعايرة خلال 24 ساعة من آخر معايرة مقبولة، فسيعود النظام إلى مرحلة التهيئة.

تحذير: قم دائماً بمعايرة النظام باستخدام عينة دم بوخز الإصبع فقط. لا تستخدم قراءة جلوكوز الدم من موضع بديل (مثل الساعد أو راحة اليد) لمعايرة النظام.

ملاحظة:

- لإجراء المعايرات اليومية، سينيبيك نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة عندما يحين وقت المعايرة بناءً على أوقات معايرتك المحددة.
- يمكنك تغيير أوقات معايرتك المحددة لتلائم جدول مواعيدك بشكل أفضل. اضغط على **Menu > Settings > Daily Calibration**.
- يمكن المعايرة قبل وقت المعايرة المحدد بمدة تصل إلى ساعتين. إذا فاتتك الوقت المحدد للمعايرة، فسينيبيك النظام كل ساعة.
- يمكنك إدخال قراءات معايرة إضافية طالما أن الفارق الزمني بين كل معايرة لا يقل عن ساعة. اضغط على **Menu > Calibrate**.
- إذا لم يكن الوقت المحدد ضمن الإطار الزمني للمعايرة، فستشير شاشة **CALIBRATE** إلى أنه لم يحن الوقت بعد لإجراء اختبار معايرة.

2. احصل على قراءة باستخدام وخز الإصبع من جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك.

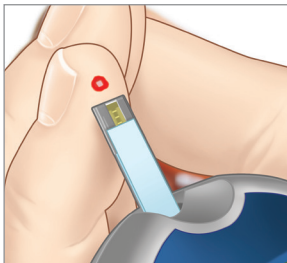

1. عندما يحين وقت المعايرة، يعرض التطبيق شاشة .CALIBRATE NOW

- اضغط على **Calibrate**.
- تظهر شاشة **CALIBRATE**.
- اضغط على **Not Now** إذا كنت تريد الانتظار لوقت لاحق.

Glucose Within Target Levels

Calibrate

Submit

Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.

Time

09:31 AM >

Glucose

----- >

Notes

>

Next Scheduled Calibration Time

Today between 03:00 PM and 06:00 PM

Days Since Insertion: 96

> Calibration Tips

NOTIFICATION

Calibrate Now

Wednesday, May 11, 03:21 PM

Your calibration is due. Please perform a fingerstick blood glucose meter calibration now.

Not Now

Calibrate

i

T000119

6

3. اضغط على **Glucose** وقم بإدخال القيمة المأخوذة من اختبار الجلوكوز بالدم بوخز الإصبع.

- اضغط على **Done**.
- اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.
- اضغط على **Done**.

6

Glucose Within Target Levels

Calibrate

Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.

Time 09:31 AM

Glucose ----

Cancel Glucose Done

150
151
152
153
154
155
156

Glucose Within Target Levels

Calibrate Submit

Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.

Time 09:31 AM

Glucose ----

Notes

Next Scheduled Calibration Time

Today between 03:00 PM and 06:00 PM

Days Since Insertion: 96


> Calibration Tips

4. تعرض شاشة CALIBRATE الآن الوقت وقراءة الجلوكوز التي أدخلتها. إذا لم تكن صحيحة، كرر الخطوة 3.

• عندما تكون صحيحة، اضغط على Submit.

5. تظهر شاشة CALIBRATION ACCEPTED.


• اضغط على OK.

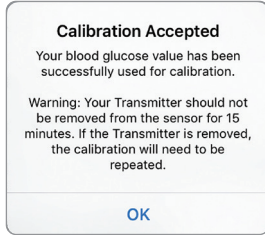

ملاحظة: قد تكون هناك حالات حيث لا تكون نتيجة المعايرة مقبولة. انظر معايرة النظام للاطلاع على المزيد من المعلومات.

Glucose Within Target Levels	
Calibrate	Submit
Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.	
Time	09:31 AM >
Glucose	153 mg/dL >
Notes	>
Next Scheduled Calibration Time	
Today between 03:00 PM and 06:00 PM	
Days Since Insertion: 96	
> Calibration Tips	

6. تظهر شاشة MY GLUCOSE وعليها أيقونة نقطة دم حمراء لتبين المعايرة بوخز الإصبع.

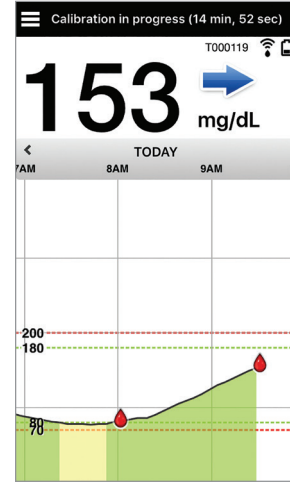

مهم: ينبغي عدم فك جهاز الإرسال الذكي من فوق المستشعر لمدة لا تقل عن 5 دقائق قبل الاختبار وحتى 15 دقيقة بعد الاختبار أثناء سير المعايرة. يتيح لك شريط الحالة أعلى الشاشة أن تعرف متى تكتمل المعايرة.

7. استخدام التطبيق

يصف هذا القسم تطبيق **Eversense XL App**، بما في ذلك الشاشة الرئيسية والرسم البياني للاتجاه وأسهم الاتجاهات وشاشة القائمة.

يتصل التطبيق بجهاز الإرسال الذكي ليتلقى بيانات الجلوكوز والاتجاهات والرسوم البيانية والتنبيهات ثم يعرضها. كما يخزن التطبيق ذاكرة فحوصات الجلوكوز حتى 90 يوماً من تخزين البيانات.

ملاحظة: عندما تسجل الخروج من تطبيق Eversense XL App، فإن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك لن يرسل بيانات الجلوكوز إلى التطبيق قبل أن تعود تسجيل الدخول.

من شاشة **MY GLUCOSE** تستطيع الوصول بسهولة إلى:

- قياسات مستشعر الجلوكوز في الوقت الفعلي.
- معدل مستويات الجلوكوز المتغيرة لديك واتجاهها.
- الاتجاهات البيانية لمستويات الجلوكوز لديك.
- التنبيهات (انخفاض سكر الدم وارتفاع سكر الدم).
- الأحداث مثل الوجبات والتمارين والأدوية.

ملاحظة: مطلوب اتصال لاسلكي بالإنترنت لتنزيل تطبيق Eversense XL App أو تحديثه.

فحص إعدادات جهازك المحمول

ستحتاج إلى جهاز محمول (مثل هاتفك الذكي) لتستخدم نظام Eversense XL CGM. من المهم جدًا إعداد جهازك المحمول بشكل صحيح لضمان العرض الدقيق لبيانات الجلوكوز الخاصة بك في التطبيق. اتبع تعليمات الشركة منتجة جهازك المحمول لإعداد ما يلي:

- الوقت والتاريخ.
 - تشغيل Bluetooth (تمكينه).
 - تشغيل الإشعارات.
 - شحن البطارية.
 - المنطقة الجغرافية.
 - اللغة.
 - ينبغي ألا يكون الصوت في الجهاز المحمول على وضع الذبذبة.
 - ينبغي أن يكون وضع عدم الإزعاج Do Not Disturb مغلقًا، حيث قد تؤدي بعض التطبيقات والإعدادات مثل وضع القيادة Driving Mode إلى تشغيل وضع عدم الإزعاج Do Not Disturb تلقائيًا. يرجى الرجوع إلى تعليمات جهازك المحمول للاطلاع على المزيد من المعلومات.
- إذا كان جهازك المحمول مضبوطًا على وضع عدم الإزعاج Do Not Disturb، فلن تسمع أي إشعارات من تطبيق Eversense XL App.

إدارة حساب Eversense

لأغراض الأمان إذا أدخلت كلمة مرور خاطئة ثلاث مرات على التوالي في تطبيق الهاتف المحمول، فسيتم قفل حسابك لمدة 30 دقيقة. خلال هذا الوقت، لن يكون لديك وصول لبيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) على تطبيق الهاتف المحمول.

Account Locked for 30 Minutes

You have entered an incorrect password 3 times. For security, your account is temporarily locked. Please try again at 14:27.

OK

Incorrect Password

You have entered an incorrect password 1 times. You have 2 more attempts remaining before your account is temporarily locked out.

OK

تنبيه: إذا تعذر عليك الوصول إلى بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM)، فينبغي عليك مراقبة الجلوكوز باستخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم المنزلي.

سيتحقق تطبيق Eversense Mobile الخاص بالهاتف المحمول بشكل دوري للتأكد من عدم تغيير معلومات تسجيل الدخول عبر حساب Eversense DMS الخاص بك.

New Password Detected

A new password was detected for your DMS account. To continue, log out of the app and log back in. If you did not make this change, contact customer support.

OK

ALERT

New Password Detected Wednesday, April 13, 14:34

A new password was detected for your DMS account. To continue, log out of the app and log back in. If you did not make this change, contact customer support.

OK

DEMO4527

إذا قمت بتغيير كلمة مرور حساب Eversense من شاشة DMS لتسجيل الدخول أو من صفحة تغيير كلمة مرور DMS، فيجب عليك تسجيل الخروج من تطبيق Eversense Mobile وإعادة تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة. إذا لم تتطابق كلمات المرور، فسيخطر تطبيق الهاتف المحمول ويشير إلى عدم توفر بعض الميزات، بما في ذلك عدم القدرة على مزامنة بياناتك مع حساب DMS، وكذلك عدم القدرة على إضافة مستخدمين Eversense NOW إلى دائرتك، فضلاً عن عدم القدرة على إجراء تغييرات على صورة ملفك الشخصي.

إذا قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة ثلاث مرات على التوالي على صفحة تسجيل الدخول إلى DMS، فقد لا تتوفر بعض ميزات تطبيقات الهاتف المحمول لمدة 30 دقيقة، بما في ذلك عدم مزامنة البيانات مع حساب DMS، وعدم التمكن من إضافة مستخدمين Eversense NOW إلى دائرتك، وعدم إجراء تغييرات على صورة ملفك الشخصي. يتعين عليك عدم تسجيل الخروج من تطبيق الهاتف المحمول خلال هذا الوقت.

Account Locked for 30 Minutes

An incorrect password was entered 3 times. This feature is temporarily unavailable. Please try again in 30 minutes. Do NOT log out of the mobile app for 30 minutes.

OK

تعرف على شاشة "My Glucose"

شاشة **MY GLUCOSE** هي شاشة العرض الرئيسية للتطبيق. وتعرض عدة بيانات تشمل قراءات مستشعر الجلوكوز، وسهم الاتجاه ومعدل التغير، والرسم البياني للاتجاه، والأحداث، وعمليات المعالجة، والتنبيهات والإشعارات.



ملاحظة:

- إذا لم يكن مستشعر مرتبطاً بجهاز إرسال ذكي، فستظهر أيقونة اتصال جهاز الإرسال الذكي بالمستشعر على شكل نقطة دم حمراء عليها علامة X حمراء.
- يمكنك الاطلاع على لقطة للشاشة الرئيسية على جهازك بنظام iOS إذا أضفت تطبيق Eversense XL App المصغر إلى صفحة تطبيقاتك المصغرة. للاطلاع على معلومات حول إدارة التطبيقات المصغرة، راجع دليل المستخدم لجهازك الذي يعمل بنظام iOS.
- يمكنك الاطلاع على شاشة **MY GLUCOSE** باتجاه عرضي لتصل إلى أزرار الاختصارات للاطلاع على آخر 7 أيام أو 14 يوماً أو 30 يوماً أو 90 يوماً، ويمكنك إرسال هذا العرض عبر البريد الإلكتروني بضغطة واحدة.

شريط الحالة	يقدم معلومات مهمة عن الوضع الحالي للجلكوز والنظام لديك.
معرف جهاز الإرسال الذكي	هذا هو جهاز الإرسال الذكي الذي تستخدمه الآن. يمكنك تغيير الاسم عن طريق الضغط على Settings > System .
قراءة الجلكوز الحالية	مستوى الجلكوز الحالي في الوقت الفعلي. يتم تحديث هذا كل 5 دقائق.
التاريخ والوقت	التاريخ والوقت الحاليين. يمكنك التمرير إلى اليسار أو اليمين لترى التواريخ والأوقات المختلفة.
طاقة بطارية جهاز الإرسال الذكي	يبين شحن البطارية المتبقي في جهاز الإرسال الذكي.
اتصال جهاز الإرسال الذكي بالمستشعر	يوضح قوة اتصال جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع المستشعر.
سهم الاتجاه	يبين اتجاه حركة مستويات الجلكوز لديك.
وحدة القياس	هذه هي وحدة القياس المستخدمة لعرض كل بيانات الجلكوز.
مستوى التنبيه بانخفاض/ارتفاع الجلكوز	المستويات المحددة لتنبيهات ارتفاع وانخفاض الجلكوز.

مستوى الجلوكوز المستهدف المرتفع/المنخفض

المستويات المحددة للجلوكوز المرتفع والمنخفض المستهدف (النطاق المستهدف).

علامة الأحداث المتعددة

يبين وقوع عدة أحداث في الوقت نفسه.

علامة الحدث

تبين الأحداث التي تم إدخالها يدوياً (مثل التمرين). انظر تسجيل الأحداث للاطلاع على المزيد من المعلومات.

علامة المعايير

تبين إدخال معايرة الجلوكوز بالدم.

الرسم البياني لاتجاه الجلوكوز

مستويات الجلوكوز بمرور الزمن. يمكنك التمرير للخلف والأمام لترى الاتجاهات أو التكبير لعرض بيانات مدة قصيرة تبلغ 3 ساعات أو التصغير لترى مدة تصل إلى 3 أيام.






القائمة

تقدم إمكانية التنقل بسهولة بين الأقسام المتعددة في تطبيق Eversense XL App:

Settings	Reports	My Glucose
About	Share My Data	Calibrate
	Placement Guide	Alert History
	Connect	Event Log

أسهم الاتجاهات

هناك 5 أسهم اتجاهات مختلفة تبين الاتجاه الحالي لمستويات الجلوكوز لديك ومدى سرعة تغييرها.

مستويات الجلوكوز التي ترتفع أو تنخفض تدريجيًا، والتي تنخفض أو ترتفع بمعدل يتراوح بين 0.0 mg/dL و 1.0 mg/dL في الدقيقة.	
مستوى الجلوكوز الذي يرتفع بمعدل معتدل يتراوح بين 1.0 mg/dL و 2.0 mg/dL في الدقيقة.	
مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل معتدل يتراوح بين 1.0 mg/dL و 2.0 mg/dL في الدقيقة.	
مستويات الجلوكوز التي ترتفع بمعدل سريع جدًا يزيد على 2.0 mg/dL في الدقيقة.	
مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل سريع جدًا يزيد على 2.0 mg/dL في الدقيقة.	

7

يستخدم التطبيق آخر 20 دقيقة من بيانات الجلوكوز المستمرة لحساب اتجاهات الجلوكوز.




عند عدم توافر قيم مستشعر كافية لإجراء الحساب، يظهر السهم باللون الرمادي.

الرسم البياني للاتجاه

يستخدم الرسم البياني للاتجاه لمراجعة وتحليل ذاكرة البيانات والاتجاهات في قيم الجلوكوز الخاصة بك مع الوقت. كما يعرض علامات للأحداث التي سجلتها يدويًا في التطبيق (مثل اختبارات المعايير والتمارين).

هناك عدة طرق لاستخدام الرسم البياني للاتجاه:

- المراجعة السريعة لحالتك بالمقارنة مع أهداف الجلوكوز ومستويات التنبيه التي تحددها. تشير الخطوط الحمراء المتقطعة إلى مستويات تنبيه الجلوكوز المرتفعة والمنخفضة لديك وتشير الخطوط الخضراء المتقطعة إلى مستويات الجلوكوز المستهدفة المرتفعة والمنخفضة لديك (النطاق الذي تستهدفه).
- المناطق المظلمة في الرسم البياني ذات رموز لونية على النحو التالي وفقًا لإعدادات الجلوكوز التي تقوم بإدخالها:

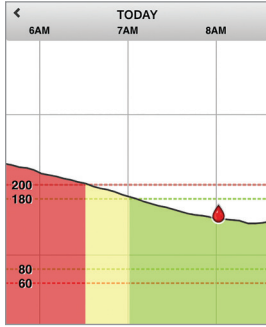

- قيم الجلوكوز التي **تقع خارج مستويات تنبيه الجلوكوز الخاصة بك** ستكون باللون الأحمر.
- قيم الجلوكوز التي **تقع ضمن مستويات الجلوكوز المستهدفة الخاصة بك** ستكون باللون الأخضر.
- قيم الجلوكوز التي **تقع بين مستويات الجلوكوز المستهدفة ومستويات التنبيه الخاصة بك** ستكون باللون الأصفر.
- اضغط باستمرار على أي نقطة في الرسم التخطيطي لتعرض قراءة معينة للجلوكوز لتلك النقطة الزمنية.
- اضغط على أي من العلامات على شاشة التطبيق لتحصل على المزيد من المعلومات عن الحدث أو التنبيه.

- قم بتصغير الشاشة أو تكبيرها لتعرض نطاقات مختلفة لليوم/الزمن على الرسم البياني للاتجاه. يمكنك التكبير والتصغير لتعرض مدة قليلة تصل إلى 3 ساعات أو حتى 3 أيام من المعلومات.

- لتعرض بيانات الرسم البياني للاتجاه لتاريخ مختلف، اضغط على التاريخ على الشاشة وأدخل التاريخ المرغوب فيه.

- يمكنك عرض الرسم البياني للاتجاه إما في وضع طولي أو عرضي. في الوضع العرضي، هناك أزرار اختصار لتري عرض 7 أيام و14 و30 و90 يومًا.

ملاحظة: سيتم تخزين كل بيانات الجلوكوز الخاصة بك في التطبيق طالما ستكون لديك ذاكرة متاحة على جهازك المحمول.

خيارات القائمة

تظهر أيقونة القائمة (☰) في الركن العلوي الأيسر على كل شاشات التطبيق وتقدم إمكانية تنقل سهلة إلى ميزات التطبيق الأخرى. تتوافر عناصر القائمة التالية:

الوصف	خيارات القائمة
شاشة التطبيق الرئيسية التي تعرض القراءة الحالية لمراقبة الجلوكوز المستمرة والاتجاه ومعدل التغير والرسم البياني للاتجاه والأحداث والتنبيهات.	My Glucose 
لإدخال قيم اختبار المعايير، تظهر شاشة CALIBRATION تلقائيًا عندما يحين وقت المعايرة ولكنك تستطيع أيضًا إدخال قيم معايرة إضافية باستخدام خيار القائمة هذا.	Calibrate 
لاستعراض التنبيهات والإشعارات السابقة، انظر وصف التنبيهات للاطلاع على المزيد من المعلومات.	Alert History 
أدخل معلومات حول الأنشطة مثل اختبارات جلوكوز الدم والوجبات والأنسولين والصحة والتمارين. انظر سجل الأحداث للاطلاع على المزيد من المعلومات.	Event Log 
استعرض عدة تقارير حول بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة لديك. انظر تقارير الجلوكوز والمشاركة للاطلاع على المزيد من المعلومات.	Reports 
للسماح للآخرين برؤية بيانات الجلوكوز الخاصة بك من خلال تطبيق Eversense NOW على الهاتف المحمول.	Share My Data 
تحقق من الاتصال بين جهاز الإرسال الذكي والمستشعر. استخدم هذه الشاشة عندما تقوم بتركيب جهاز الإرسال الذكي لكي تتأكد من إنشاء الاتصال.	Placement Guide 
للتحقق من الاتصال بين جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول. مطلوب اتصال Bluetooth لإرسال البيانات إلى التطبيق.	Connect 
قم بتخصيص الإعدادات مثل مستويات الجلوكوز المستهدفة ومستويات التنبيه والأصوات والبروفيل المؤقت وأوقات تذكير المعايرة. انظر تخصيص إعداداتك للاطلاع على المزيد من المعلومات.	Settings 
لعرض معلومات حول نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة لديك، بما في ذلك رقم معرف المستشعر ومعرف جهاز الإرسال الذكي.	About 

صورة الملف الشخصي



يمكنك إضافة صورة الملف الشخصي أو تغييرها في حسابك على Eversense XL، وستظهر في تطبيق Eversense XL CGM على الهاتف المحمول وفي حسابك على Eversense DMS.

- انتقل إلى **Main Menu** واضغط على صورة الظل.

- اتبع التنبيهات إما لتلقط صورة جديدة أو تختار صورة موجودة محفوظة على جهازك.

- ستظهر الصورة التي ستختارها على شاشة **Main Menu**.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تغيير صورة الملف الشخصي من حسابك على Eversense DMS. انظر دليل مستخدم Eversense DMS للاطلاع على المزيد من المعلومات.

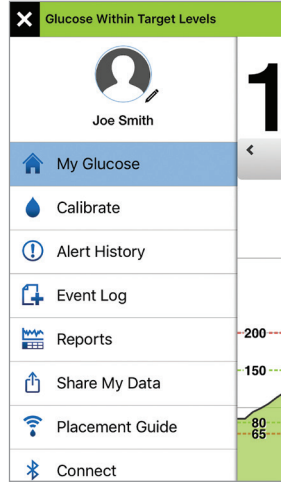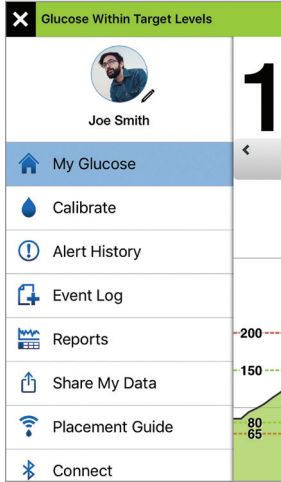

8. تخصيص إعداداتك

يصف هذا القسم كيفية تخصيص الإعدادات في نظام **Eversense XL CGM** الخاص بك.

تشمل المجالات حيث يمكنك تخصيص إعدادات التطبيق ما يلي:

- **Glucose** - مستويات الجلوكوز ومعدلات التغير التي ستؤدي إلى إطلاق تنبيه.
- **Daily Calibration** - تذكيرات المعايرة الصباحية والمساءية.
- **System** - يحدد معلومات مخصصة حول نظامك أو يتيح لك إمكانية إدخالها.
- **Mealtimes** - أوقات تناولك كل وجبة لكي تستطيع تقارير الجلوكوز أن تساعد في إظهار الطريقة التي قد تؤثر بها الوجبات على القراءات.
- **Sound Settings** - لتغيير الأصوات لبعض تنبيهات الجلوكوز وضبط أوقات الغفوة ووضع عدم الإزعاج لتطبيق Eversense XL App.
- **Temp Profile** - لضبط ملف شخصي مؤقت للجلوكوز.
- **Log Out** - لتسجيل الخروج من حسابك على Eversense XL.

مستويات الجلوكوز

صُمم نظام Eversense XL CGM ليقدم تنبيهات على جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول الخاصين بك عندما تصل مستويات الجلوكوز لديك إلى مستويات التنبيه التي حدتها. ستحدد إعدادات تنبيهات الجلوكوز الخاصة بك والقيم المستهدفة ومعدلات التغير بناءً على معلومات ستحصل عليها من مقدم رعايتك الصحية.

تحذير:

- قبل اتخاذ قرار بشأن تحديد الجرعات، قم بإجراء اختبار جلوكوز بالدم بوخز الإصبع للتأكد من نتيجة مستشعر الجلوكوز.
- صُممت تنبيهات ارتفاع الجلوكوز وانخفاضه لتساعدك على التعامل مع إصابتك بالسكري وينبغي عدم استخدامها وحدها لاكتشاف انخفاض سكر الدم أو ارتفاع سكر الدم. ينبغي استخدام التنبيهات دائمًا بالتزامن مع المؤشرات الأخرى لحالة نسبة السكر مثل مستوى الجلوكوز والاتجاه والرسم البياني الخطي وغير ذلك.

مهم:


- تختلف تنبيهات انخفاض الجلوكوز وارتفاعه عن الأهداف التي حددتها للجلوكوز المنخفض والمرتفع.
- تبلغك تنبيهات انخفاض الجلوكوز وارتفاعه على جهازك المحمول وجهاز الإرسال الذكي الخاص بك عندما تتجاوز قيمة منخفضة أو مرتفعة معينة.
- تُستخدم أهداف الجلوكوز في التقارير والرسوم البيانية الخطية لتبين كيف كان أداء مستويات الجلوكوز لديك بالمقارنة مع الأهداف التي حددتها. لن تتلقى تنبيهًا عندما تصل إلى مستويات الجلوكوز المستهدفة لديك.

ضبط مستويات الجلوكوز المستهدفة


أهداف الجلوكوز هي المستويات المنخفضة والمرتفعة للنطاق الذي تهدف إلى تحقيقه طوال اليوم. تُستخدم هذه الإعدادات في التطبيق لتشير متى تكون قيم الجلوكوز ضمن نطاقك المستهدف.

<p>منخفض: 80 mg/dL مرتفع: 140 mg/dL</p> <p>يمكنك تغيير هذا النطاق المستهدف بناءً على ما تتفق عليه مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك باعتباره المستويات المستهدفة المناسبة لك.</p>	<p>الإعداد الافتراضي</p>
<p>منخفض: 65 - 120 mg/dL مرتفع: 120 - 345 mg/dL</p>	<p>الإعداد المسموح به</p>
<p>التشغيل دائمًا (لا يمكن إيقاف تشغيله)</p>	<p>إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل</p>
<p>تُستخدم في الرسوم البيانية والتخطيطية على التطبيق لتوضيح الوقت المنقضي في النطاق المستهدف.</p>	<p>ملاحظات</p>

1. اضغط على **Menu > Settings > Glucose** لعرض شاشة **GLUCOSE SETTINGS**.

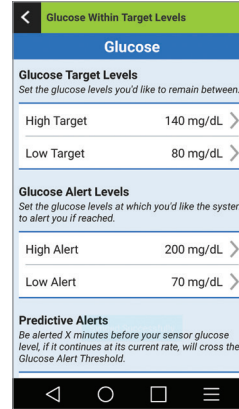



Android

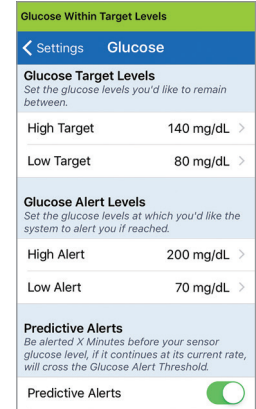

iOS

2. من **Glucose Target Levels**، اضغط على **High Target** وحدد مستوى الجلوكوز المستهدف المرتفع الملائم.

- اضغط على **Done** عندما تنتهي.
- كرر الخطوة لتحديد اختيار **Low Target**.

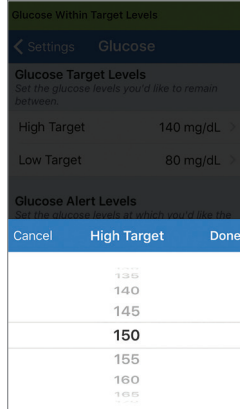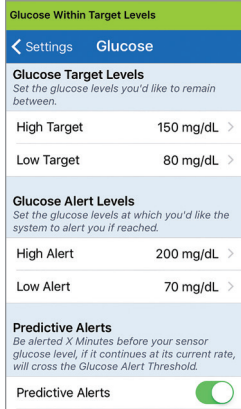

ضبط مستويات تنبيه الجلوكوز

سينبهك نظام Eversense XL CGM عندما تتجاوز مستويات الجلوكوز إعدادات التنبيه التي اخترتها. عندما تصل إلى مستويات تنبيه الجلوكوز المنخفض والمرتفع الخاصة بك، يصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبية ويعطي تطبيق الهاتف المحمول إنذارًا صوتيًا إلى جانب عرض رسالة على الشاشة. ينبغي عليك إجراء اختبار جلوكوز بالدم بوخز الإصبع فورًا قبل اتخاذ قرار علاجي.

<p>منخفض: 70 mg/dL مرتفع: 200 mg/dL</p> <p>يمكنك تغيير مستويات التنبيه هذه بناءً على ما تتفق عليه مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك باعتبارها المستويات المناسبة لك. لا يمكن تعيين تنبيه انخفاض الجلوكوز على مستوى أعلى من مستوى الجلوكوز المنخفض المستهدف، ولا يمكن تعيين تنبيه ارتفاع الجلوكوز على مستوى أقل من مستوى الجلوكوز المرتفع المستهدف.</p>	<p>الإعداد الافتراضي</p>
<p>منخفض: 60 - 115 mg/dL مرتفع: 125 - 350 mg/dL</p>	<p>الإعداد المسموح به</p>
<p>التشغيل دائماً (لا يمكن إيقاف تشغيله)</p>	<p>إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل</p>
<p>الإشعار الصوتي والتنبيهات البصرية في جهازك المحمول والتنبيهات المذبذبة على الجسم من جهاز الإرسال الذكي.</p>	<p>ملاحظات</p>

2. من Glucose Alert Levels، اضغط على High Alert وحدد مستوى التنبيه لارتفاع الجلوكوز.

- اضغط على Done عندما تنتهي.
- كرر الخطوة لتحديد اختبار Low Alert.

1. اضغط على Menu > Settings > Glucose لعرض شاشة .GLUCOSE SETTINGS

8

Glucose Within Target Levels	
< Settings	Glucose
High Target	150 mg/dL >
Low Target	80 mg/dL >
Glucose Alert Levels	
Set the glucose levels at which you'd like the system to alert you if reached.	
High Alert	250 mg/dL >
Low Alert	70 mg/dL >
Predictive Alerts	
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will cross the Glucose Alert Threshold.	
Predictive Alerts	<input checked="" type="checkbox"/>
Minutes	30 >

Glucose Within Target Levels	
< Settings	Glucose
High Target	150 mg/dL >
Low Target	80 mg/dL >
Glucose Alert Levels	
Set the glucose levels at which you'd like the system to alert you if reached.	
High Alert	200 mg/dL >
Cancel	High Alert Done
235	
240	
245	
250	
255	
260	
265	

Glucose Within Target Levels	
< Settings	Glucose
Glucose Target Levels	
Set the glucose levels you'd like to remain between.	
High Target	150 mg/dL >
Low Target	80 mg/dL >
Glucose Alert Levels	
Set the glucose levels at which you'd like the system to alert you if reached.	
High Alert	200 mg/dL >
Low Alert	70 mg/dL >
Predictive Alerts	
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will cross the Glucose Alert Threshold.	
Predictive Alerts	<input checked="" type="checkbox"/>

ضبط التنبيهات التنبؤية

تتيح لك التنبيهات التنبؤية أن تعرف مسبقاً أنه من المرجح ظهور حدث ارتفاع أو انخفاض الجلوكوز إذا استمرت الاتجاهات الحالية. تستخدم التنبيهات التنبؤية مستويات تنبيه الجلوكوز المنخفض والمرتفع لتقدم إنذاراً "مبكراً". عندما تصل إلى وقت الإنذار المبكر، يصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبية ويعطي تطبيق الهاتف المحمول إنذاراً صوتياً إلى جانب عرض رسالة على الشاشة. ينبغي عليك إجراء اختبار جلوكوز بالدم بوخز الإصبع فوراً قبل اتخاذ قرار علاجي.

الإعداد الافتراضي	OFF
الإعداد المسموح به	قبل 10 أو 20 أو 30 دقيقة
إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل	يمكنك تشغيل هذه الميزة. لن تحدث تنبيهات تنبؤية قبل تشغيل هذه الميزة. القيمة الافتراضية هي 20 دقيقة.
ملاحظات	الإشعار الصوتي والتنبيهات البصرية في جهازك المحمول والتنبيهات المذبذبة على الجسم من جهاز الإرسال الذكي.

2. بجوار Predictive Alerts، قم بتمرير الزر إلى ON.

3. اضغط على Minutes لتحديد مدة الإنذار المبكر.

• اضغط على Done عندما تنتهي.

Glucose Within Target Levels

< Settings Glucose

Low Alert 60 mg/dL >

Predictive Alerts
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will cross the Glucose Alert Threshold.

Predictive Alerts ☒

Minutes 30 >

Rate Alerts
Be alerted when your sensor glucose level is changing (rising or falling) faster than the set Rate of Change.

Rate Alerts ☐

Rate of Change N/A >

Glucose Within Target Levels

< Settings Glucose

Low Alert 60 mg/dL >

Predictive Alerts
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will cross the Glucose Alert Threshold.

Predictive Alerts ☒

Minutes 30 >

Cancel Minutes Done

10

20

30

1. لتشغيل هذه الميزة، اضغط على Menu > Settings > Glucose شاشة GLUCOSE SETTINGS.

Glucose Within Target Levels

< Settings Glucose

Low Alert 70 mg/dL >

Predictive Alerts
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will cross the Glucose Alert Threshold.

Predictive Alerts ☒

Minutes 30 >

Rate Alerts
Be alerted when your sensor glucose level is changing (rising or falling) faster than the set Rate of Change.

Rate Alerts ☐

Rate of Change N/A >

ضبط تنبيهات معدل التغير

تتيح لك تنبيهات معدل التغير معرفة متى تنخفض مستويات الجلوكوز لديك أو ترتفع بشكل أسرع من إعداد تنبيه معدل التغير الذي اخترته.

الإعداد الافتراضي	OFF
الإعداد المسموح به	1.5 - 5 mg/dL في الدقيقة
إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل	يمكنك تشغيل هذه الميزة. لن تحدث تنبيهات معدل التغير قبل تشغيل هذه الميزة.
ملاحظات	الإشعار الصوتي والتنبيهات البصرية في جهازك المحمول والتنبيهات بالاهتزاز من جهاز الإرسال.

2. بجوار Rate Alerts، قم بتمرير الزر OFF يميناً إلى ON.

3. اضغط على Rate of Change لتحديد المعدل.

• اضغط على Done عندما تنتهي.

8

Glucose Within Target Levels

< Settings Glucose

Low Alert 60 mg/dL >

Predictive Alerts
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will cross the Glucose Alert Threshold.

Predictive Alerts ☒

Minutes 30 >

Rate Alerts
Be alerted when your sensor glucose level is changing (rising or falling) faster than the set Rate of Change.

Rate Alerts ☒

Rate of Change 3.0 mg/dL/min >

Glucose Within Target Levels

< Settings Glucose

Minutes 30 >

Rate Alerts
Be alerted when your sensor glucose level is changing (rising or falling) faster than the set Rate of Change.

Rate Alerts ☒

Rate of Change 3.0 mg/dL/min >

Cancel Rate of Change Done

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

1. لتشغيل هذه الميزة، اضغط على 1. لتشغيل هذه الميزة، اضغط على Menu > Settings > Glucose شاشة GLUCOSE SETTINGS.

Glucose Within Target Levels

< Settings Glucose

Low Alert 70 mg/dL >

Predictive Alerts
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will cross the Glucose Alert Threshold.

Predictive Alerts ☒

Minutes 30 >

Rate Alerts
Be alerted when your sensor glucose level is changing (rising or falling) faster than the set Rate of Change.

Rate Alerts ☐

Rate of Change N/A >

تعيين أوقات المعايرة اليومية

يتم تعيين أوقات المعايرة الصباحية والمساءية لتذكيرك بوقت المعايرة. يمكنك إجراء المعايرة قبل وقت المعايرة المحدد بمدة تصل إلى ساعتين. يجب أن يتراوح الفاصل الزمني بين أوقات المعايرة الصباحية والمساءية بين 10 ساعات و 14 ساعة.

4. عندما يكون كلا الوقتين صحيحين، اضغط على .Save

Glucose Within Target Levels

< Settings Daily Calibration Save

Set the morning and evening times at which you'd like to be reminded to calibrate.

Note: Morning and evening calibration times must be between 10 and 14 hours apart.

Morning	07:00 AM >
Evening	06:00 PM >

2. اضغط على Morning لضبط وقت معايرتك الصباحية.

• اضغط على Done عندما تنتهي.

3. اضغط على Evening لضبط وقت معايرتك المسائية.

• اضغط على Done عندما تنتهي.

Glucose Within Target Levels

< Settings Daily Calibration Save

Set the morning and evening times at which you'd like to be reminded to calibrate.

Note: Morning and evening calibration times must be between 10 and 14 hours apart.

Morning Time

6	59	
7	00	AM
8	01	PM

Cancel Done

Android

Glucose Within Target Levels

< Settings Daily Calibration Save

Set the morning and evening times at which you'd like to be reminded to calibrate.

Note: Morning and evening calibration times must be between 10 and 14 hours apart.

Morning

6	59	
7	00	AM
8	01	PM

Cancel Morning Time Done

iOS

1. اضغط على > Menu Settings > Daily Calibration.

Glucose Within Target Levels

< Settings Daily Calibration Save

Set the morning and evening times at which you'd like to be reminded to calibrate.

Note: Morning and evening calibration times must be between 10 and 14 hours apart.

Morning	08:00 AM >
Evening	06:00 PM >

تتيح لك شاشة **SYSTEM** إمكانية عرض الإعدادات الأخرى وتعديلها في نظام Eversense XL CGM الخاص بك.

1. اضغط على **Menu > Settings > System** لعرض شاشة **SYSTEM**.

2. في شاشة **SYSTEM** يمكنك الضغط على كل مما يلي لضبط:

- **Glucose Units**. وحدة القياس لقراءات الجلوكوز الخاصة بك.
يجب إعادة تثبيت التطبيق لتعديل هذا الإعداد.
- **Name**. الرقم التسلسلي لجهاز الإرسال الذكي الخاص بك. يمكنك أيضًا الضغط على الرقم التسلسلي المعروف هنا وإعطاء اسم مخصص لجهاز الإرسال الذكي الخاص بك.
- **Linked Sensor**. الرقم التسلسلي للمستشعر المرتبط حاليًا بجهاز الإرسال الذكي. اضغط على هذه الميزة للتمكن من ربط مستشعر أو إعادة ربطه.

Glucose Within Target Levels	
< Settings	System
Glucose Units	mg/dL
Name	T000119 >
Linked Sensor	7679 >

ضبط جدول أوقات الوجبات

تعرض شاشة **MEAL TIMES** الفسحات الزمنية لإفطارك وغدائك ووجبتك الخفيفة وعشاءك وأوقات نومك. تُستخدم الفواصل الزمنية المحددة على شاشة **MEAL TIMES** في عرض الرسم البياني للتقارير لتوضيح قيم مراقبة الجلوكوز المستمرة المرتفعة والمنخفضة والمتوسطة أثناء كل فاصل زمني لموعد وجبة.

1. اضغط على **Menu > Settings > Meal Times** لعرض شاشة **MEAL TIMES**.


2. اضغط على وقت كل وجبة مدرجة ثم اضغط على **Start** و**End** لضبط بداية ونهاية وقت الوجبة.

Glucose Within Target Levels	
< Settings	Meal Times
Time periods for Meal Times table	
Breakfast	06:00 AM-10:00 AM >
Lunch	10:00 AM-02:00 PM >
Snack	02:00 PM-06:00 PM >
Dinner	06:00 PM-10:00 PM >
Sleep	10:00 PM-06:00 AM >


ضبط الأصوات

تعرض شاشة **SOUND SETTINGS** إعدادات صوت التنبيه للجلكوز المنخفض والجلكوز المرتفع. كما تتيح لك هذه الشاشة إمكانية إدخال إعداد غفوة للتنبيهات المدرجة.

2. اضغط على كل تنبيه لتحديد صوت التنبيه. اضغط على Back للعودة إلى شاشة SOUND SETTINGS.

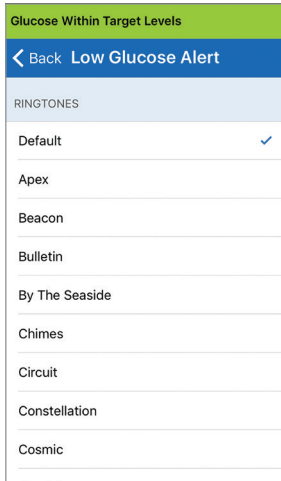


1. اضغط على Menu > Settings > Sound Menu > Settings لعرض شاشة SOUND SETTINGS.

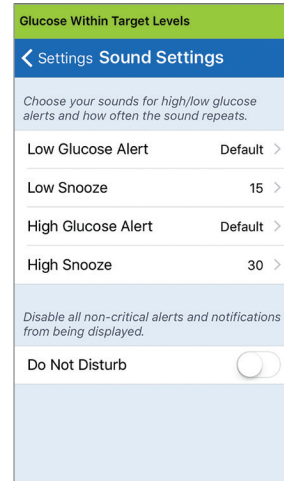

مهم: احرص على تشغيل الصوت في جهازك المحمول. إذا أوقفت تشغيل الصوت في جهازك المحمول، فلن تسمع أي أصوات من التطبيق.

بتعيين تنبيه الغفوة، يمكنك تعيين عدد تكرارات التنبيه بعد تلقي تنبيه انخفاض الجلوكوز وارتفاعه.

3. اضغط على كل تنبيه غفوة لضبط مدى تكرار التنبيه. اضغط على Done عندما تنتهي.

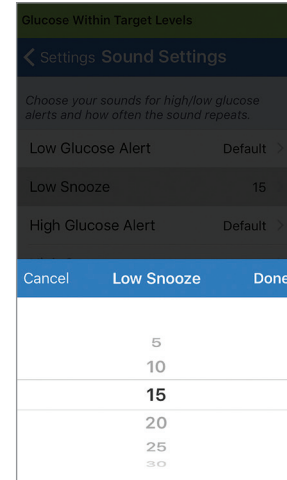

كما تتيح لك شاشة **SOUND SETTINGS** إمكانية تمكين وضع عدم الإزعاج وتعطيله.

- **Do Not Disturb**. يجعل التطبيق وجهاز الإرسال الذكي في وضع عدم الإزعاج "Do Not Disturb".
- **OFF** - كل الإشعارات - التنبيهات والإشعارات - بغض النظر عن طبيعتها الحرجة سيتم تقديمها من جهاز الإرسال الذكي والتطبيق.
- **ON** - سيتم تقديم التنبيهات الحرجة فقط بواسطة التطبيق والذبذبة على الجسم من جهاز الإرسال الذكي.

ملاحظة: عندما تقوم بتمكين وضع عدم الإزعاج في جهازك المحمول، لن تتلقى أي تنبيهات أو إشعارات من تطبيق Eversense XL App. للاطلاع على قائمة بالتنبيهات، يرجى الاطلاع على أوصاف التنبيهات.

ضبط الملف الشخصي المؤقت

أثناء الأنشطة أو الحالات التي تقع خارج روتينك المعتاد، قد ترغب في أن تستخدم بشكل مؤقت إعدادات جلوكوز تختلف عن إعدادات الجلوكوز القياسية التي أدخلتها. تتيح لك شاشة **TEMP PROFILE** إمكانية تغيير إعدادات الجلوكوز المستهدف وتنبيه الجلوكوز مؤقتاً للمدة التي تختارها. عندما تنتهي مدة الملف الشخصي المؤقت، تعود من جديد إعدادات الجلوكوز القياسية التي أدخلتها في **Glucose < Settings**.

2. حدد المدة. يمكنك ضبط الملف الشخصي المؤقت لمدة تصل إلى 36 ساعة بزيادات تبلغ 30 دقيقة.

1. اضغط على Menu > Settings > Temp Profile
لعرض شاشة TEMP PROFILE.

8

Glucose Within Target Levels

< Settings Temp Profile

Set the glucose levels at which you'd like the system to alert when your Temp Profile is ON. Tap START to activate; tap STOP to deactivate.

Duration 0hr 30min >

High Target 165 mg/dL >

Cancel Duration Done

0hr

1hr 0min

2hr 30min

3hr 45min

Glucose Within Target Levels

< Settings Temp Profile

Set the glucose levels at which you'd like the system to alert when your Temp Profile is ON. Tap START to activate; tap STOP to deactivate.

Duration 0hr 30min >

High Target 165 mg/dL >

Low Target 90 mg/dL >


High Alert 200 mg/dL >

Low Alert 70 mg/dL >

START

لا يمكن تغيير اختيارات الملف الشخصي المؤقت عندما تبدأ المدة.

أثناء نشاط الملف الشخصي المؤقت، ستظهر أيقونة الملف الشخصي المؤقت على شاشة **.MY GLUCOSE**

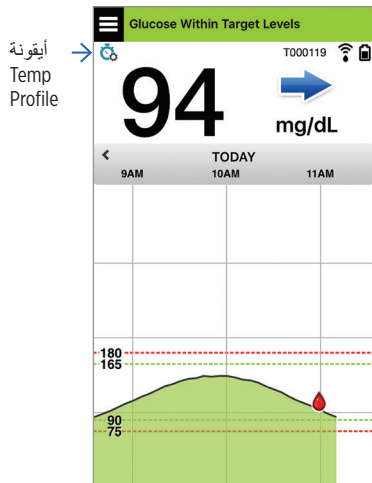

3. اضبط الهدفين المرتفع والمنخفض ومستوى التنبيه المرتفع والمنخفض المرغوب فيهما. اضغط على **START**.

Glucose Within Target Levels	
< Settings Temp Profile	
High Target	165 mg/dL >
Low Target	90 mg/dL >
High Alert	180 mg/dL >
Low Alert	70 mg/dL >
Cancel	Low Alert Done
60	
65	
70	
75	
80	
85	

Glucose Within Target Levels	
< Settings Temp Profile	
Duration	1hr 0min >
High Target	165 mg/dL >
Low Target	90 mg/dL >
High Alert	180 mg/dL >
Cancel	High Alert Done
170	
175	
180	
185	
190	
195	

لإنهاء الملف الشخصي المؤقت قبل الوقت الذي حددته،
انتقل إلى **Settings < Temp Profile** واضغط
على **STOP**.

Glucose Within Target Levels

< Settings Temp Profile

Set the glucose levels at which you'd like the system to alert when your Temp Profile is ON. Tap START to activate; tap STOP to deactivate.

Duration	0hr 59min left >
High Target	165 mg/dL >
Low Target	90 mg/dL >
High Alert	180 mg/dL >
Low Alert	75 mg/dL >

STOP

عندما تنتهي مدة الملف الشخصي المؤقت، يعرض التطبيق
إشعاراً وتختفي أيقونة Temp Profile من شاشة
.MY GLUCOSE

Temp Profile Off



Your Temporary Profile duration has ended. Your standard glucose settings will now resume.

OK

Temp Profile

تسجيل الخروج

لتسجيل الخروج من حسابك على
Eversense XL، اضغط على
Settings > Log Out.

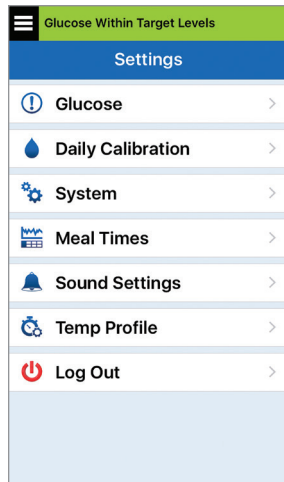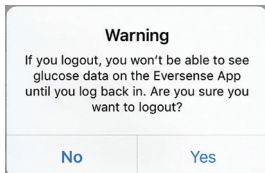

مهم: إذا سجلت الخروج، فلن تظهر أي بيانات جلوكوز على التطبيق قبل أن تعيد تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين أدخلتهما عندما أعددت حسابك لأول مرة.

9. أوصاف التنبيه

يصف هذا القسم التنبيهات ورسائل الإشعارات المتعددة التي قد تراها على شاشات تطبيق **Eversense XL App** والإجراءات التي قد تحتاج إلى اتخاذها.


يقدم لك نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة تنبيهات وإشعارات مرتبطة بقرارات الجلوكوز وحالة النظام على كل من جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول الخاصين بك. يقدم جهاز الإرسال الذكي تنبيهات مذبذبة على الجسم عند الوصول إلى مستوى تنبيه. يصدر تطبيق الجهاز المحمول صوت تنبيه ويعرض الرسائل على شاشة **MY GLUCOSE**. يصف الجدول أدناه أنماط المذبذبة على جهاز الإرسال الذكي والمؤشرات على تطبيقك.


التنبيهات والإشعارات	نمط مذبذبة جهاز الإرسال الذكي	مؤشرات التنبيه في التطبيق
التنبيهات حيث لا يمكن عرض قيم جلوكوز تتطلب إجراء فوريًا وملائمًا.	3 مذبذبات طويلة	تظهر الرسالة باللون الأصفر
التنبيهات المرتبطة بانخفاض الجلوكوز تنبيه بانخفاض الجلوكوز. تتطلب إجراء فوريًا وملائمًا.	3 مذبذبات قصيرة $\times 3$	تظهر الرسالة باللون الأصفر
التنبيهات المرتبطة بانخفاض الجلوكوز التنبؤي والجلوكوز المنخفض خارج النطاق تتطلب إجراء فوريًا وملائمًا.	3 مذبذبات قصيرة	تظهر الرسالة باللون الأصفر
التنبيهات المرتبطة بارتفاع الجلوكوز تنبيه ارتفاع الجلوكوز، الارتفاع التنبؤي والارتفاع خارج النطاق. تتطلب إجراء فوريًا وملائمًا.	مذبذبة طويلة ثم مذبذبتان قصيرتان	تظهر الرسالة باللون الأصفر
التنبيهات المرتبطة بالمشكلات الأقل أهمية تتطلب بعض الإجراءات لكنها قد لا تكون حرجية بالقدر نفسه بطبيعتها. انظر القسم التالي للاطلاع على أمثلة.	مذبذبة قصيرة واحدة	تظهر الرسالة باللون الأصفر
الإشعارات تتطلب بعض الإجراءات لكنها ليست حرجية بطبيعتها. انظر القسم التالي للاطلاع على أمثلة.	مذبذبة قصيرة واحدة	تظهر الرسالة باللون الأزرق


Alert History

تعرض شاشة **ALERT HISTORY** التنبيهات والإشعارات التي تلقيتها.

تُستخدم الرموز التالية لتوضيح مستوى شدة الرسائل.

التنبيهات 

الإشعارات 










أكثر من تنبيه واحد في الفترة نفسها 

تنبيهات البطارية 

ملاحظة: عندما تتلقى تنبيهين أو أكثر لم يتم الاطلاع عليهما، سيرعرض التطبيق خيار **Dismiss All**. يمكن أن يحدث هذا عندما يكون جهازك المحمول خارج نطاق جهاز الإرسال الذكي الخاص بك ثم يعيد المزامنة. يمكنك مراجعة كل تنبيه في **Alert History**.

1. اضغط على **Alert > Menu > History**.







- ستعرض شاشة **ALERT HISTORY** كل التنبيهات والإشعارات لذلك اليوم.
- اضغط على أي رسالة لتحصل على المزيد من المعلومات.

Glucose Within Target Levels		
Alert History		
ALL		
	Predicted High Glucose	01:25 PM >
	Calibrate Now	08:00 AM >
	Predicted Low Glucose	01:04 AM >
	Charge Transmitter	12:24 AM >
Saturday, May 14, 2016		
	Predicted High Glucose	09:39 PM >
	Predicted Low Glucose	06:24 PM >
	Calibrate Now	06:00 PM >
Friday, May 13, 2016		
Sat 14 May, 2016		

أمثلة على الكل

2. يمكنك أن تختار إدراج رسائل معينة فقط (تنبيهات وإشعارات وما إلى ذلك) للاطلاع عليها عن طريق الضغط على رموز التنبيه المحددة.

- اضغط على **ALL**، ثم اضغط على الأيقونات الموجودة أعلى الشاشة لتحديد أنواع التنبيهات التي تريد عرضها فقط.
- اضغط على **Menu** عندما تنتهي.

Glucose Within Target Levels		
Alert History		
ALL		
Tuesday, April 19, 2016		
	Predicted Low Glucose	10:55 AM >
Monday, April 18, 2016		
	High Glucose	09:31 PM >
Sunday, April 17, 2016		
	High Glucose	09:48 PM >
Saturday, April 16, 2016		
	High Glucose	09:27 PM >
Tue 19 April, 2016		

أمثلة على التنبيهات فقط


أوصاف التنبيهات وإجراءاتها

يسرد الجدول التالي التنبيهات والإشعارات التي قد تتلقاها على تطبيق Eversense XL App.

ملاحظة: مع كل رسالة، يمكنك أيضاً أن تضغط على أيقونة المعلومات  لتتلقى تفاصيل إضافية عن الرسالة.


مهم: لا يمكن إيقاف التنبيهات التي عليها علامة * في التطبيق أو جهاز الإرسال الذكي باستخدام وضع عدم الإزعاج في إعدادات التطبيق.

التنبيهات

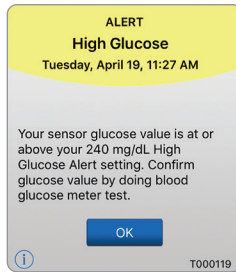

*High Glucose

يظهر في الفترة التي تقوم بإدخالها في الإعدادات الصوتية عندما تكون قراءات مستشعر الجلوكوز مساوية لمستوى التنبيه لارتفاع الجلوكوز أو أعلى منه. فترة التكرار الافتراضية هي 30 دقيقة.

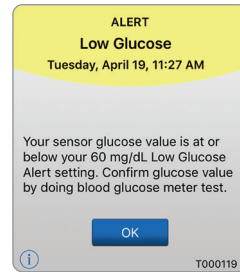

*Low Glucose

يظهر في الفترة التي تقوم بإدخالها في الإعدادات الصوتية عندما تكون قراءات مستشعر الجلوكوز مساوية لمستوى التنبيه لانخفاض الجلوكوز أو أقل منه. فترة التكرار الافتراضية هي 15 دقيقة.

شاشة التطبيق

الوصف



الإجراءات

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج.

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج.

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

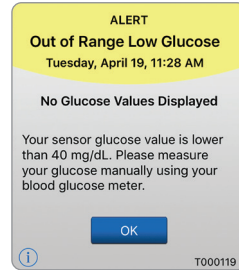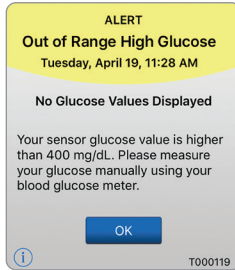

شاشة التطبيق

9

*Out of Range High Glucose

يظهر عندما تكون قيمة الجلوكوز لديك أعلى من 400 mg/dL.

لا يمكن عرض قراءة جلوكوز (تظهر كلمة **HI** فقط على شاشة **(MY GLUCOSE)**).

*Out of Range Low Glucose

يظهر عندما تكون قراءة الجلوكوز لديك أقل من 40 mg/dL.

لا يمكن عرض قراءة جلوكوز (تظهر كلمة **LO** فقط على شاشة **(MY GLUCOSE)**).

الوصف

الإجراءات



قم بقياس الجلوكوز لديك يدويًا عن طريق استخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك. تأكد دائمًا من قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج.

بمجرد أن تصل قيمة مستشعر الجلوكوز إلى 400 mg/dL أو تقل عنها، ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور على الشاشة.

قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج. بمجرد أن تصل قيمة مستشعر الجلوكوز إلى 40 mg/dL أو تتجاوزها، ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور على الشاشة.

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

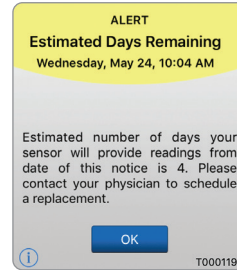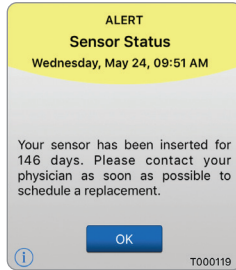

شاشة التطبيق

(Days 146) Sensor Status

يظهر عندما يكتشف النظام أنه قد تم إدخال مستشعر ك منذ 146 يومًا.

(4) Days Remaining

يظهر عندما يكتشف النظام أن مستشعر ك قد لا يقدم المزيد من القراءات خلال 4 أيام.

الوصف



تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد لإخراج مستشعر ك وإدخال المستشعر الجديد.

تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد لإخراج مستشعر ك وإدخال المستشعر الجديد.

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

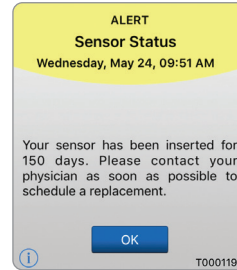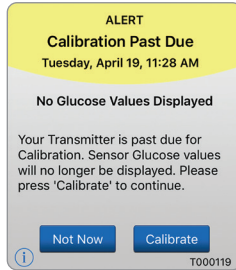

شاشة التطبيق

9

Calibration Past Due

يظهر عندما يتجاوز النظام لديك موعد المعايرة.
لا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل إجراء المعايرة.

(Days 150) Sensor Status



يظهر عندما يكتشف النظام أنه قد تم إدخال مستشعرك منذ
150 يومًا.

الوصف

الإجراءات

قم بإجراء معايرة باستخدام وخز الإصبع لكي تستأنف عرض
قيم الجلوكوز.

تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد
لإخراج مستشعرك وإدخال المستشعر الجديد.

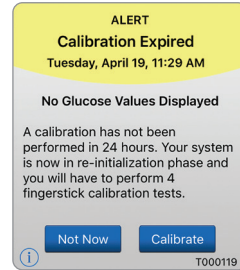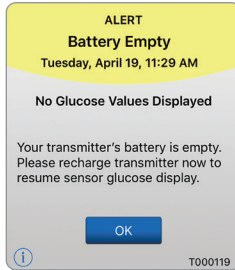

شاشة التطبيق

*Battery Empty

يظهر مرة واحدة عندما تكون بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة وتحتاج إلى شحنها.
لا يمكن عرض قراءة الجلوكوز قبل شحن جهاز الإرسال الذكي.

Calibration Expired



يظهر عندما لا يتم إجراء معايرة لمدة 24 ساعة. يعود النظام إلى مرحلة التهيئة.
لا يمكن عرض قراءة الجلوكوز قبل إجراء المعايرة.

الوصف

قم بشحن جهاز الإرسال الذكي فوراً. أبعد جهاز الإرسال الذكي عن جسمك قبل توصيله بمصدر الطاقة.

في مرحلة التهيئة، يجب عليك إجراء 4 اختبارات معايرة بوخز الإصبع بفارق زمني يتراوح بين ساعتين و 12 ساعة. ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور بعد ثاني اختبار ناجح للمعايرة بوخز الإصبع.

الإجراءات

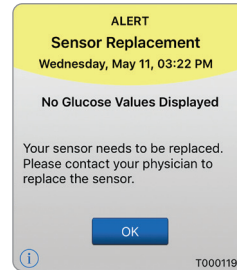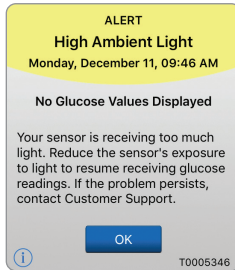

شاشة التطبيق

9

High Ambient Light

يظهر كل 60 دقيقة عندما يتلقى مستشعرك الكثير جدًا من الضوء المحيط مما يؤثر على قدرته على التواصل مع جهاز الإرسال الذكي.

لا يمكن عرض قراءة الجلوكوز قبل خفض الضوء المحيط.

*Sensor Replacement

يظهر مرة واحدة عندما يحتاج مستشعرك إلى الاستبدال. لا يمكن عرض قراءة الجلوكوز قبل استبدال المستشعر.

الوصف


قم بتقليل الضوء المحيط عن طريق إجراء واحد أو أكثر مما يلي:

- انتقل إلى منطقة حيث يقل التعرض للضوء.
- ضع شيئًا داكنًا فوق جهاز الإرسال الذكي.
- قم بارتداء جهاز الإرسال الذكي تحت الملابس.

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)


التنبيهات

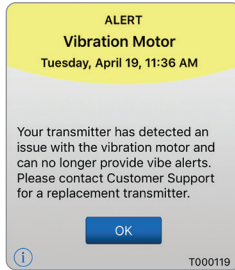

Vibration Motor

يظهر كل 60 دقيقة عندما لا يعود محرك الذنب في جهاز الإرسال الذكي قادراً على توفير تنبيهات مذبذبة على الجسم. سيستمر ظهور قراءات الجلوكوز لمدة 72 ساعة بعد تلقي رسالة التنبيه. بعد 72 ساعة، ستلقَى تنبيه خطأ في جهاز الإرسال كل 20 دقيقة إلى أن تستبدل جهاز الإرسال الذكي.

اتصل بدعم العملاء لتستبدل جهاز الإرسال الذكي فوراً.

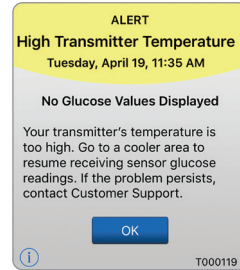

High Smart Transmitter Temperature*



يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي لديك مرتفعة جداً. لا تظهر قراءة الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي ضمن ظروف التشغيل العادية.

قم بتخفيض درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي عن طريق الانتقال إلى بيئة أبرد. بمجرد أن تقل درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي عن 42 درجة مئوية (108 درجات فهرنهايت)، سيستأنف عرض قيم الجلوكوز. يمكنك فك جهاز الإرسال الذكي مؤقتاً للتبريده. بمجرد أن يعود جهاز الإرسال الذكي إلى درجة حرارة أقل، احرص على أن تعيد وضعه فوق المستشعر.

شاشة التطبيق

الوصف

الإجراءات

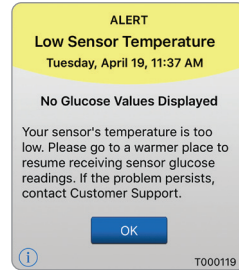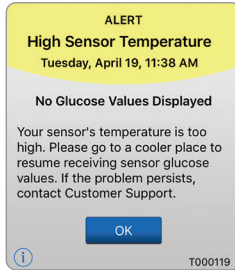

شاشة التطبيق

9

*High Sensor Temperature

يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة المستشعر مرتفعة جداً. لا تظهر قراءة الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة المستشعر ضمن ظروف التشغيل العادية.

*Low Sensor Temperature

يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة المستشعر منخفضة جداً. لا تظهر قراءة الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة المستشعر ضمن ظروف التشغيل العادية.

الوصف



انتقل إلى بيئة أبرد لتقلل درجة حرارة المستشعر. اخلع جهاز الإرسال الذكي مؤقتاً أثناء تبريد درجة حرارة المستشعر لتتراوح بين 26 و 40 درجة مئوية (81 إلى 104 درجة فهرنهايت). ثم أعد وضع جهاز الإرسال الذكي لتبدأ في تلقي قيم الجلوكوز مرة أخرى من المستشعر.

انتقل إلى بيئة أكثر دفئاً لترفع درجة حرارة المستشعر. استمر في تشغيل جهاز الإرسال الذكي لكي تبدأ في تلقي قيم الجلوكوز عندما تتراوح درجة حرارة المستشعر بين 26 و 40 درجة مئوية (81 إلى 104 درجة فهرنهايت).

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

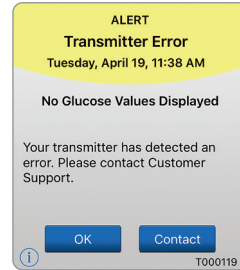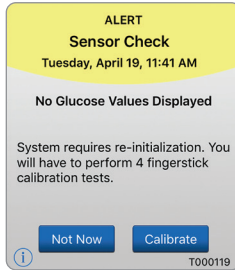

شاشة التطبيق

Sensor Check

يظهر مرة واحدة عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام عدم استقرار مع المستشعر مما يتطلب العودة إلى مرحلة تهيئة المعايرة.

*Smart Transmitter Error

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام وجود خطأ في جهاز الإرسال الذكي. لا يتم عرض قراءة الجلوكوز قبل تصحيح الخطأ.

الوصف

في مرحلة التهيئة، يجب عليك إجراء 4 اختبارات معايرة بوخز الإصبع بفارق زمني يتراوح بين ساعتين و12 ساعة. ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور بعد ثاني اختبار ناجح للمعايرة بوخز الإصبع.


إذا لم يظهر الجلوكوز لأكثر من 10 دقائق، فقم بتوصيل جهاز الإرسال الذكي بمفخذ كهرباء في الجدار ثم افصله. انتظر لمدة 10 دقائق.

إذا استمر عدم عرض الجلوكوز، فاتبع الخطوات المعروضة في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإعادة ضبط جهاز الإرسال الذكي. إذا كنت لا تستطيع إكمال عملية إعادة الضبط، فاتصل بدعم العملاء.

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)


التنبيهات

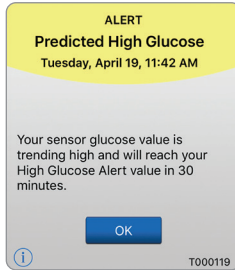

Predicted High Glucose

يظهر كل 60 دقيقة عندما تتجه قيم الجلوكوز لديك للارتفاع وستصل إلى مستوى التنبيه بارتفاع الجلوكوز خلال الوقت الذي أدخلته في الإعدادات.

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج.

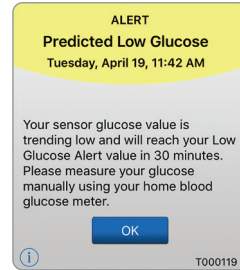

Predicted Low Glucose



يظهر كل 60 دقيقة عندما تتجه قيم الجلوكوز لديك للانخفاض وستصل إلى مستوى التنبيه بانخفاض الجلوكوز خلال الوقت الذي أدخلته في الإعدادات.

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج.

شاشة التطبيق

الوصف

الإجراءات

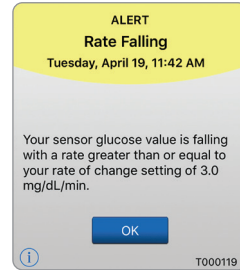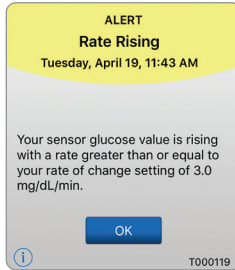

شاشة التطبيق

Rate Rising

يظهر كل 60 دقيقة عندما ترتفع قيمة الجلوكوز لديك بمعدل يساوي معدل التغير الذي أدخلته في الإعدادات أو بمعدل أسرع منه.

Rate Falling

يظهر كل 60 دقيقة عندما تهبط قيم الجلوكوز لديك بمعدل يساوي معدل التغير الذي أدخلته في الإعدادات أو بمعدل أسرع منه.

الوصف


انتبه جيدًا لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج.

انتبه جيدًا لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج.

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)


التنبيهات

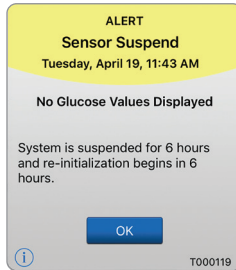

Sensor Suspend

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام الحاجة إلى إعادة تشغيل مرحلة التهيئة لإجراء معايير إضافية. ستظهر قيم الجلوكوز بعد دقائق قليلة من نجاح ثاني معايرة أثناء مرحلة التهيئة.

تبدأ إعادة تشغيل النظام خلال 6 ساعات.

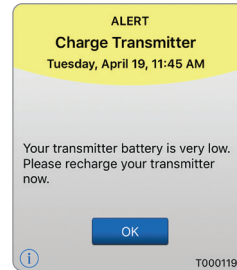

Charge Smart Transmitter

يظهر عندما يكون شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي منخفضًا جدًا وتحتاج إلى شحن بطارك سريًا جدًا.

اشحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك في أسرع وقت ممكن.



شاشة التطبيق

الوصف

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

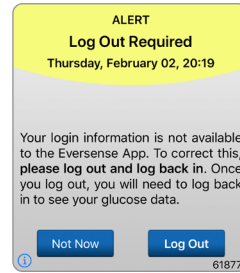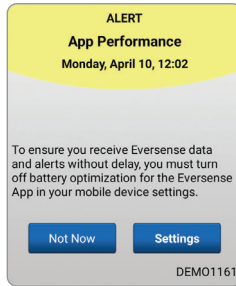

شاشة التطبيق

*App Performance

يظهر يوميًا بأنظمة التشغيل Android عندما يكتشف النظام وجود أعطال متكررة بالتطبيق، أو حدوث انقطاعات في اتصال Bluetooth نتيجة تضمين تطبيق Eversense بإعدادات تحسين البطارية.

Log Out Required

يظهر كل 24 ساعة لمستخدمي نظام التشغيل iOS عندما يكتشف النظام أن بيانات اعتماد Eversense غير متوفرة عبر ميزة سلسلة مفاتيح iOS.

الوصف

انتقل إلى إعدادات تحسين بطارية هاتفك وأوقف تشغيل تطبيق Eversense لضمان عدم تأخير تنبيهات Eversense.



سجل الخروج من تطبيق الهاتف المحمول، وسجل الدخول مجددًا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين.

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

شاشة التطبيق	<p>Calibration Under Review</p> <p>Your entered calibration value of 100 mg/dL may be inaccurate. Please calibrate again in 1 hour to ensure glucose accuracy.</p> <p>OK</p>	<p>Incompatible Firmware Version</p> <p>Incompatible Firmware Version detected. Please contact Customer Support.</p> <p>OK</p>
الوصف	<p>Calibration Under Review</p> <p>يظهر عندما تختلف قيمة معاييرك كثيرًا عن قيمة مستشعر الجلوكوز الخاص بك.</p>	<p>Incompatible Firmware Version</p> <p>يظهر عندما يكون البرنامج الثابت لجهاز الإرسال الذكي الخاص بك غير متوافق مع إصدار تطبيق الجهاز المحمول Eversense XL في جهازك المحمول.</p>
الإجراءات	<p>أعد المعايرة عند الطلب.</p>	<p>اتصل بدعم العملاء.</p>

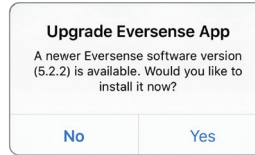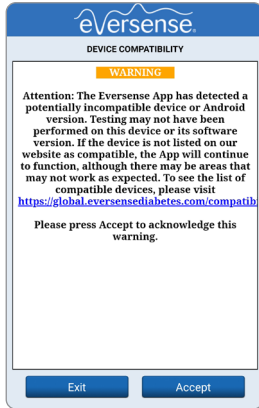

شاشة التطبيق

Incompatible Device/Operating System

يظهر عند استخدام جهاز/نظام تشغيل غير متوافق مع التطبيق.

Upgrade Eversense App

يظهر عندما يتوفر إصدار أحدث من تطبيق Eversense App للتنزيل.


الوصف

للاطلاع على قائمة بالأجهزة/نظم التشغيل المتوافقة، تفضل بزيارة الموقع

<https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>


اضغط على **Yes** لتنصيب التحديث.

الإجراءات

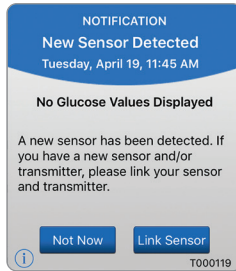

New Sensor Detected

يظهر عندما يكتشف جهاز الإرسال الذكي مستشعراً جديداً. يجب ربط المستشعر الذي تم إدخاله مع جهاز الإرسال الذكي لبدء الاتصال.

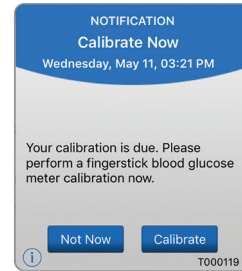

Calibrate Now

يظهر كل 60 دقيقة عندما يحين وقت إجرائك للمعايرة.



شاشة التطبيق

الوصف

الإجراءات

اضغط على **Link Sensor** لتكتمل عملية الربط وتبدأ مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة. لا تحتاج إلى ارتداء جهاز الإرسال الذكي الخاص بك فوق المستشعر حتى تكتمل مرحلة الإحماء.

قم بإجراء اختبار جلوكوز بالدم بوخز الإصبع وأدخل القراءة لتكون قيمة معايرتك. لا تستخدم موضعاً بديلاً (مثل المساعد) لتحصل على قراءة جلوكوز الدم الخاصة بك.

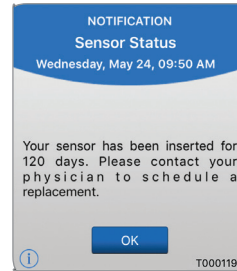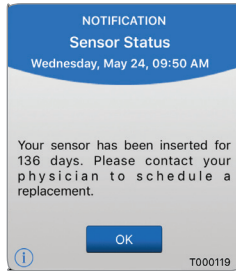

شاشة التطبيق

(Days 136) Sensor Status

يظهر عندما يكتشف النظام أنه قد تم إدخال مستشعرك منذ 136 يوماً.

(Days 120) Sensor Status

يظهر عندما يكتشف النظام أنه قد تم إدخال مستشعرك منذ 120 يوماً.

الوصف

تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد لإخراج مستشعرك وإدخال المستشعر الجديد.

تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد لإخراج مستشعرك واستبداله.

الإجراءات

10. سجل الأحداث

يصف هذا القسم كيفية مراجعة الأحداث وتسجيلها للمساعدة في تتبع أنماط الجلوكوز بشكل أفضل.

عرض الأحداث

يمكنك مشاهدة الأحداث السابقة التي تم إدخالها من شاشة **EVENT LOG**.

Glucose Within Target Levels		
Event Log +		
ALL		
Tuesday, April 19, 2016		
Health, Normal	11:18 AM	>
Calibration, 139 mg/dL	10:32 AM	>
Glucose, 100 mg/dL	09:08 AM	>
Calibration, 79 mg/dL	08:02 AM	>
Breakfast, 18 grams	07:15 AM	>
Exercise, 0hr 30min	06:00 AM	>
Monday, April 18, 2016		
Dinner, 15 grams	08:18 PM	>
Tue 19 April, 2016		

1. اضغط على

.Menu > Event Log

ستظهر شاشة **EVENT LOG**.

2. سيتم سرد كل الأحداث التي أدخلتها.

يمكنك أيضاً تحديد أنواع أحداث معينة ترغب بمشاهدتها عن طريق الضغط على نوع حدث محدد.

- اضغط على **ALL**، ثم اضغط على الأيقونات الموجودة أعلى الشاشة لتحديد أنواع الأحداث التي تريد عرضها فقط.

يتيح لك نظام Eversense XL CGM إمكانية تسجيل الأحداث وتتبعها بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لمستويات الجلوكوز. يمكنك أن تدخل يدوياً الأحداث التي ستظهر على الرسم البياني للاتجاه وفي تقارير الجلوكوز لمساعدتك في التوصل إلى أنماط حالة الجلوكوز لديك.

أنواع الأحداث:

- الجلوكوز
- الوجبات
- الأنسولين
- الصحة
- التمارين

ملاحظة: يمكنك أيضاً الوصول إلى شاشة **ADD EVENT** مباشرة من شاشة **MY GLUCOSE** بضغط واحدة في أي مكان على منطقة الرسم البياني.



أدخل اختبارات مقياس الجلوكوز بالدم وتتبعها (نتائج الاختبارات بخلاف المعايير).

1. اضغط على Menu > Event Log.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث "Glucose < +".

3. اضغط على Time لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.
اضغط على Done.

4. اضغط على Glucose لإدخال القيمة الصحيحة للجلكوز في الدم. اضغط على Done.

ملاحظة: يمكنك إدخال قيمة جلوكوز بالدم بين 20 و 600 mg/dL. سيتم تحويل الإدخالات الأقل من 20 mg/dL إلى 20 و سيتم تحويل الإدخالات الأكبر من 600 mg/dL إلى 600 لأغراض الحساب والعرض.

5. اضغط على Save.

6. في مربع Confirm Glucose المنبثق، اضغط على Submit لتأكيد

حدث الجلوكونز والعودة إلى شاشة **EVENT LOG** أو اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات أو لتعديل المعلومات قبل حفظها.

ملاحظة: أحداث الجلوكون لا تحل محل قياسات المعايرة. سيبقى إدخال قراءات المعايرة إلزامياً.

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Glucose	Save
Time	Sep 9, 2016 04:36 PM	>
Glucose	100 mg/dL	>
Notes		>

Glucose Within Target Levels

Event Log

ALL [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon]

Tuesday, April 19, 2016

- Glucose**
- Meal**
- Insulin**
- Health**
- Exercise**
- Cancel**

Confirm Glucose

Time: 11:13 AM

Value: 100 mg/dL

Cancel

Submit

Android

Confirm Glucose

Time: Sep 9, 2016 04:36 PM

Value: 100 mg/dL

Cancel

Submit

iOS



أدخل نوع الوجبة والتاريخ والوقت وتعداد الكربوهيدرات.

Glucose Within Target Levels	
Cancel	Meal
Save	
Time	Sep 9, 2016 09:37 AM >
Type	Breakfast >
Carbs	15 grams >
Notes	>

1. اضغط على **Menu > Event Log**.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث **“+”** < **Meals**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.
اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Type** لإدخال نوع الوجبة.
اضغط على **Done**.

5. اضغط على **Carbs** لإدخال العدد الصحيح من الكربوهيدرات.
اضغط على **Done**.

6. اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.
اضغط على **Done**.

7. اضغط على **Save** لحفظ الإدخال والعودة إلى شاشة **EVENT LOG**. اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات.



أدخل وحدات الأنسولين وفقًا للوقت ونوع الأنسولين.

Glucose Within Target Levels	
Cancel	Insulin
Save	
Time	Sep 9, 2016 04:37 PM >
Units	2.0 >
Type	Rapid-acting >
Notes	>

1. اضغط على **Menu > Event Log**.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث **“+” < Insulin**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.
اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Units** لإدخال العدد الصحيح من الوحدات.
اضغط على **Done**.

ملاحظة: أقصى عدد من وحدات الأنسولين يمكن إدخاله هو 200 وحدة.

5. اضغط على **Type** لإدخال نوع الأنسولين الصحيح.
اضغط على **Done**.

6. اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.
اضغط على **Done**.

7. اضغط على **Save** لحفظ الإدخال والعودة إلى شاشة **EVENT LOG**. اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات.



أدخل نوع الحالة الصحية وحدتها والتاريخ والوقت.

Glucose Within Target Levels	
Cancel	Health
Save	
Time	Sep 9, 2016 03:30 PM >
Severity	Medium >
Condition	Fever >
Notes	>

1. اضغط على **Menu > Event Log**.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث **"Health < "+"**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.

اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Severity** لاختيار حدة منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة.

اضغط على **Done**.

5. اضغط على **Condition** لإدخال الحالة الصحية.

اضغط على **Done**.

6. اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.

اضغط على **Done**.

7. اضغط على **Save** لحفظ الإدخال والعودة إلى شاشة **EVENT LOG**.

اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات.



Glucose Within Target Levels	
Cancel	Exercise
Save	
Time	Jun 15, 2016 08:46 AM >
Intensity	Medium >
Duration	1hr 0min >
Notes	>

1. اضغط على **Event Log > Menu**.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث **+** < **Exercise**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.

اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Intensity** لاختيار شدة منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة.

اضغط على **Done**.

5. اضغط على **Duration** لإدخال المدة.

اضغط على **Done**.

6. اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.

اضغط على **Done**.

7. اضغط على **Save** لحفظ الإدخال والعودة إلى شاشة **EVENT LOG**.

اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات.

11. التقارير

يصف هذا القسم تقارير الجلو كوز المختلفة المتاحة لتلخيص حالة الجلو كوز لديك. يمكنك اختيار تواريخ محددة أو تحديد نطاقات زمنية محددة سابقاً.

أنواع التقارير

- الملخص الشكلي الأسبوعي.
- الرسم البياني الدائري للجلو كوز.
- إحصائيات الجلو كوز.

ملاحظة: احرص على ضبط تاريخ الجهاز المحمول ووقته بشكل صحيح. تعتمد دقة الرسوم البيانية والتقارير على صحة التاريخ والوقت.

لعرض تقارير الجلو كوز ، اضغط على **Menu > Reports** وتمرر للتنقل عبر التقارير الثلاثة المختلفة. يمكنك أيضاً إرسال كل تقرير عبر البريد الإلكتروني كملف pdf عن طريق الضغط على أيقونة البريد الإلكتروني في الركن العلوي الأيمن.


الملخص الشكلي الأسبوعي

يبين هذا التقرير آخر سبعة أيام من قراءات الجلوكوز لديك ملخصة بهيئة رسم بياني خطي لمدة ٢٤ ساعة للمساعدة في التوصل إلى أنماط أثناء اليوم.

- يمثل **الخط الأزرق** متوسط آخر سبعة أيام من قراءاتك في وحدة زمنية مدتها ساعة.
- تعرض **الأشرطة الحمراء** أعلى وأقل قراءات فعلية في وحدة الساعة الزمنية نفسها.
- تمثل **الخطوط الأفقية الحمراء المنقطعة** مستويات تنبيه الجلوكوز المرتفع والمنخفض التي حددتها سابقاً.
- تمثل **الخطوط الأفقية الخضراء المنقطعة** مستويات الجلوكوز المستهدفة المرتفعة والمنخفضة التي حددتها سابقاً.


كما يقدم هذا التقرير إحصاءات موجزة (متوسط القراءات، الانحراف المعياري للقراءات)، أداء الجلوكوز المستهدف (النسبة المئوية للقراءات ضمن مستويات الجلوكوز المستهدفة والأعلى منها والأقل منها) وقراءات الجلوكوز المرتفعة والمنخفضة (النسبة المئوية للقراءات التي تقع ضمن مستويات الجلوكوز المستهدفة المنخفضة والمرتفعة). تظهر المعلومات بناء على الفسحات الزمنية لأوقات الوجبات.

ملاحظة: لمراجعة الفسحات الزمنية لأوقات الوجبات أو تغييرها، يرجى الاطلاع على ضبط جنول أوقات الوجبات.

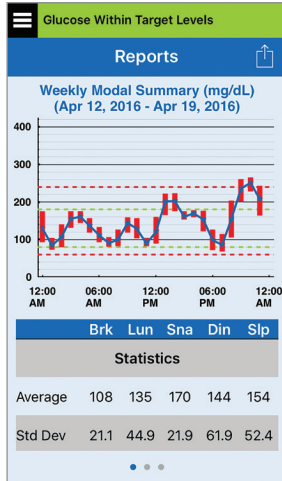


الرسم البياني الدائري للجلوكوز

يوضح هذا التقرير بتنسيق بياني النسبة المئوية للقراءات الخاصة بك في نطاق المدة الزمنية التي حدثت فيها، وهل هي أقل من مستويات الجلوكوز المستهدفة أم أعلى منها. يمكنك اختيار آخر يوم أو 7 أيام أو 14 يوماً أو 30 يوماً أو 90 يوماً.

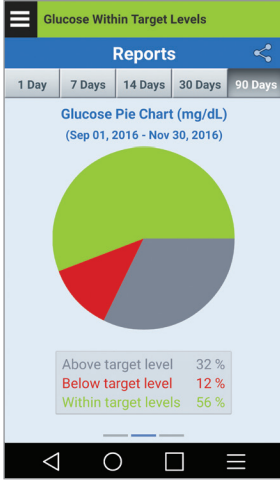

Android

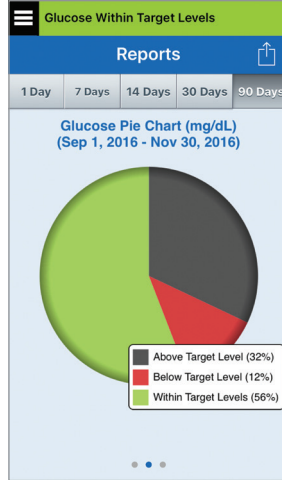

iOS

إحصائيات الجلوكوز

يوضح هذا التقرير متوسط قراءات الجلوكوز والقراءات المنخفضة والمرتفعة، بالإضافة إلى الانحراف المعياري في نطاق مدة الفسحة الزمنية لأوقات الوجبات. يمكنك اختبار آخر يوم أو 7 أيام أو 14 يوماً أو 30 يوماً أو 90 يوماً.

Glucose Within Target Levels				
Reports				
1 Day	7 Days	14 Days	30 Days	90 Days
Glucose Statistics (mg/dL) (Mar 20, 2016 - Apr 19, 2016)				
Period	Avg.	Low	High	Std Dev
Breakfast	108	82	158	21.1
Lunch	135	83	221	44.9
Snack	170	123	222	21.9
Dinner	144	69	260	61.9
Sleep	154	74	264	52.4
ALL	144	69	264	50.2
...				

برنامج Eversense Data Management Software (DMS)

برنامج Eversense DMS هو تطبيق يستند على الانترنت يتيح للمرضى ومقدمي الرعاية ومزودي الرعاية الصحية عرض وتحليل بيانات الجلوكوز المرسلة من جهاز إرسال Eversense XL الذكي أو تطبيق الجهاز المحمول لنظام Eversense XL CGM. يتم تقديم هذا البرنامج مجانًا لمستخدمي نظام Eversense XL CGM. للتعرف على برنامج Eversense DMS، انتقل إلى الموقع <https://global.eversensedidiabetes.com/>. عندما تقوم بإنشاء حسابك أو تسجيله أثناء تثبيت تطبيق Eversense XL للجهاز المحمول، يتم إنشاء حساب على Eversense DMS تلقائيًا من أجلك. يحتوي دليل مستخدم تطبيق Eversense NOW على المزيد من المعلومات حول كيفية رؤية بيانات الجلوكوز عن بُعد من نظام Eversense XL CGM.

مهم: لا يقدم نظام إدارة بيانات EVERSENSE مشورة طبية. ينبغي عدم إجراء تغييرات في خطة علاجك إلا من جانب مزود رعايتك الصحية.






طالما أن لديك اتصالاً بالإنترنت، فإن المزامنة التلقائية تعمل وأنت في حالة تسجيل الدخول إلى التطبيق وتترامن قراءات الجلوكوز الخاصة بك مع حسابك على Eversense DMS كل 5 دقائق تقريباً. يمكنك إيقاف تشغيل المزامنة التلقائية.

لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية، اضغط على **Sync** في شاشة

SHARE MY DATA. اضغط على الزر **Auto Sync** لإيقاف التشغيل.


لمزامنة بياناتك يدوياً، اضغط على الزر **START SYNC**. ستتم مزامنة بياناتك لعدد الأيام المحدد كخيارك الافتراضي. يمكنك ضبط أيام المزامنة الافتراضية على يوم واحد أو 3 أيام أو 7 أيام أو 14 يوماً أو 30 يوماً.

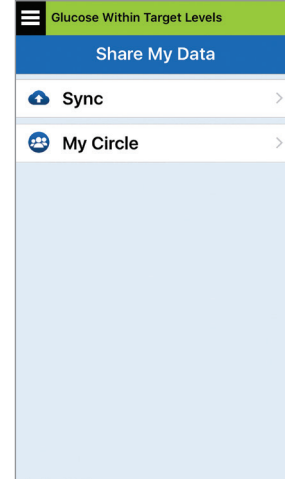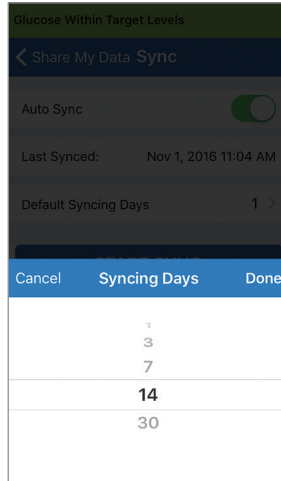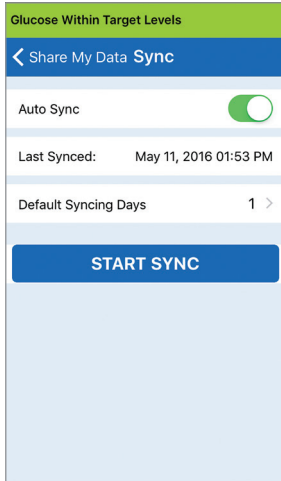

مهم: إذا أوقفت تشغيل المزامنة التلقائية، فلن يتم إرسال بياناتك إلى أي أحد يستخدم تطبيق Eversense NOW لمراقبة بيانات الجلوكوز الخاصة بك عن بُعد ولن يتم تخزين بيانات الجلوكوز التاريخية الخاصة بك في حسابك على DMS.



My Circle هي ميزة اختيارية تتيح لك إمكانية تنشيط المراقبة عن بُعد لبيانات Eversense XL CGM الخاصة بك. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه الميزة، انظر *My Circle* - المراقبة عن بُعد.

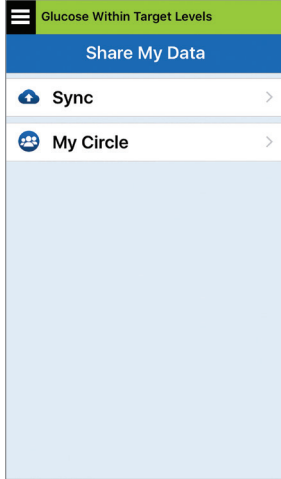

13. معلومات المنتج والمعلومات العامة على التطبيق

يصف هذا القسم المعلومات المتاحة من قسم **About** في **Main Menu**.

يمكنك عرض معلومات المنتج الخاصة بجهاز الإرسال الذكي والمستشعر وتطبيق **Eversense XL** للجهاز المحمول.

يمكنك أن ترى على شاشة **MY SENSOR** الرقم التسلسلي للمستشعر وتفاصيل الإدخال.

يمكنك أن تجد في الشاشة **MY TRANSMITTER** معلومات تتضمن الرقم التسلسلي ومعلومات المعايير ومستوى شحن البطارية.

1. اضغط على **About > Menu**
اضغط على **My Transmitter**
أو **My Sensor** أو **Product Information**.

Glucose Within Target Levels	
< About My Sensor	
Linked SN	7679
Insertion Date	5/3/16
Insertion Time	08:00 PM
Detected SN	7679

Glucose Within Target Levels	
< About My Transmitter	
Name	T000119
Serial Number	205
Model Number	101567
Firmware Version	6.21.02
Last Cal	5/11/16, 1:57 PM
Phase Start	5/11/16, 11:45 AM
Completed Cals	2
Current Phase	Initialization
RSSI	-93

Glucose Within Target Levels	
About	
My Transmitter	>
My Sensor	>
Product Information	>
Contact Us	>
License Agreement	>
Privacy Statement	>
Help	>

لقراءة اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
وسياسة الخصوصية، اضغط على أي
من الخيارات.

Glucose Within Target Levels

< About **eversense**

END USER LICENSE AGREEMENT

Introduction

We at Senseonics Inc. ("Senseonics", "us" or "we") seek to improve the lives of people with diabetes by enhancing their ability to manage the disease with relative ease and accuracy. To enable this, our products collect certain personal and health information. We are committed to respecting your privacy, protecting your data that we collect, and letting you decide how your information is used and shared.

- We will be transparent about our data practices and will explain them in clear language.
- We will never sell your data, and will only share personally identifiable data when you direct us to or under the circumstances outlined in this Privacy Policy.
- We will always take the security of your data seriously.

Senseonics' glucose monitoring products and tools are designed to avoid many of the problems of traditional sensor technologies and to provide an unmatched combination of accuracy and long sensor life. This Privacy Policy applies to the following:

- data collected by our subcutaneous Eversense Sensor and our Eversense Smart Transmitter (our "Devices");
- the Eversense Mobile Medical Application and any other mobile applications we may develop (each a "Mobile App" and collectively the "Mobile Apps");
- personal computer and cloud-based applications such as the Eversense Diabetes Management Software that permit

العثور على موزك المحلي على موقعنا
الإلكتروني، اضغط على **Help**.

يمكنك أيضًا إرسال تعقيبات أو عرض
اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي
وسياسة الخصوصية من قائمة **About**.

- اضغط على **Contact Us** لإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى شركة Senseonics, Inc.

Glucose Within Target Levels

Cancel Message for Cust... Send

To:

Cc/Bcc:

Subject: Message for Customer Support

These messages are not monitored 24/7. Do not use this email for urgent questions.

*Transmitter Details:

مهم: لا تتم مراقبة هذا البريد الإلكتروني على مدار الساعة. لا تستخدم هذا البريد الإلكتروني في أمور مرتبطة بالصحة أو أي أمور عاجلة.

على شاشة **PRODUCT INFORMATION** يمكنك رؤية معلومات عن إصدار برنامج تطبيق الجهاز المحمول وعن شركة Senseonics, Inc، وهي الشركة منتجة نظام Eversense XL CGM.

Glucose Within Target Levels

< About **Product Information**

eversense
Continuous Glucose Monitoring System

Company: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway,
Germantown, Maryland, USA
global.eversensedabetes.com

UDI / DI: 00817491023544

UDI / Version: 7.1.2

Released: Jul 15, 2022

Compatibility: <https://global.eversensedabetes.com/compatibility/>

© 2022 Senseonics, Inc.
Eversense Mobile Application (iOS)

CE

FG-5101-02-300

Senseonics

١٤. عرض بيانات Eversense XL على ساعة Apple Watch

يمكنك عرض لقطة لبيانات Eversense XL CGM الخاصة بك على ساعة Apple Watch. بمجرد تنزيل تطبيق Eversense XL للجهاز المحمول وتنبيته على جهازك المحمول، اتبع تعليمات Apple Watch لإضافة التطبيق إلى ساعتك.

تُعتبر ساعة Apple Watch شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense XL CGM وينبغي عدم استخدامها بدلاً من شاشة Eversense XL CGM الرئيسية.


في حالة وجود مشكلات في الأجهزة المحمولة أو الإنترنت اللاسلكي أو اتصال البيانات أو نظام إدارة البيانات (Eversense Data Management System (DMS أو إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بمستخدم مراقبة الجلوكوز المستمرة خارج نطاق الجهاز المحمول، أو في حالة شحن جهاز الإرسال الذكي، قد يؤدي ذلك إلى تأخير في نقل البيانات أو عدم عرضها.

إذا شعرت في أي وقت بأعراض انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم أو ارتفاعه أو إذا كانت الأعراض لديك لا تتسق مع قراءات مستشعر الجلوكوز، ينبغي أن تختبر الجلوكوز لديك باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار علاجي.


عرض Glance

عرض Eversense XL Apple Watch Glance ليس متاحًا لمستخدمي Apple Watch التي تعمل بنظام watchOS 3.0 أو إصدار أعلى. إذا كان نظام تشغيل Apple Watch يدعم عرض Glance، وقد ضبطت بالفعل تطبيق Eversense XL App على جهازك المحمول على الإعداد **Show in Glances** تحت إعدادات Apple Watch، فليس عليك سوى التمرير لأعلى على شاشة **HOME** بالساعة لتعرض Eversense XL App Glance.


يمكنك أيضًا الوصول إلى شاشة **MY GLUCOSE** إذا قمت بتشغيل الإشعارات من Eversense XL في إعدادات Apple Watch الخاصة بك. عندما تتلقى إشعارًا، يمكنك أيضًا النقر فوق الرسالة لترى شاشة **MY GLUCOSE**.

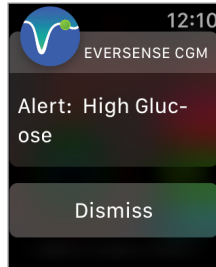


للوصول إلى ميزات التطبيق الإضافية، اضغط على أيقونة **Eversense XL** في شاشة **HOME** بالساعة لتفتح التطبيق.

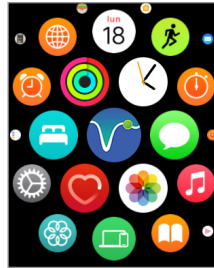


تظهر معلومات شريط الحالة وقيمة الجلوكوز الحالية مع سهم الاتجاه وعمر البطارية المتبقي في جهاز الإرسال الذكي.

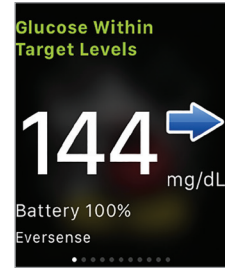


مرر لليسار إلى الشاشة التالية التي تعرض الجلوكوز الحالي لديك مع سهم الاتجاه ووقت معايرتك التالية ومرحلة معايرة النظام الحالي.

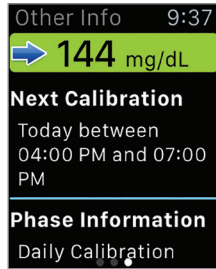


مرر لليسار إلى الشاشة التالية التي تعرض رسمًا بيانيًا دائريًا لإجمالي الوقت ضمن نطاقك المستهدف وخارجه لأخر 24 ساعة.

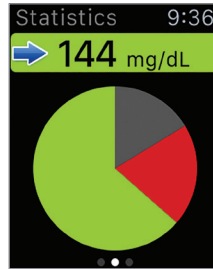

تبين شاشة **My Glucose** الجلوكوز الحالي لديك مع سهم الاتجاه ورسمًا بيانيًا للاتجاه لأخر ثلاث ساعات من بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة لديك.

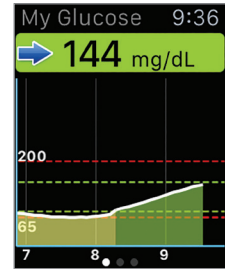

مرر لأعلى لعرض البيانات نفسها كنسب مئوية.

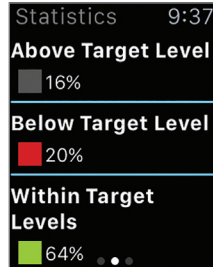

المراقبة عن بُعد باستخدام نظام Eversense XL CGM وتطبيق Eversense NOW

يشمل تطبيق Eversense XL CGM ميزة اختيارية للمراقبة عن بُعد. يتفاعل تطبيق Eversense XL CGM مع تطبيق مراقبة الجلوكوز عن بُعد Eversense NOW Remote Glucose Monitoring للسماح للأخيرين بالاطلاع على بياناتك.

المخاطر

قد تكون هناك أوقات لا يمكن فيها إرسال بيانات الجلوكوز إلى تطبيق Eversense NOW. إذا كان أحد الأعضاء في دائرتك لا يتلقى بيانات الجلوكوز من نظام Eversense XL CGM، فلن يستطيع مساعدتك في حالة حدوث ارتفاع في قيمة الجلوكوز أو انخفاضها. الشاشة الثانوية والإشعارات في تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول ليسا بديلاً عن الشاشة الرئيسية في تطبيق الجهاز المحمول لنظام Eversense XL CGM.

قد لا يكون لدى أعضاء دائرتك دائماً اتصال يدعم نقل البيانات مثل الإنترنت/الواي فاي أو 4G/LTE/3G. إذا لم يكن لديك أو لدى أحد الأعضاء في دائرتك اتصال بالإنترنت، فإن بيانات الجلوكوز الخاصة بك لن تكون متاحة للعرض على شاشة ثانوية. في حالة وجود مشكلات في الأجهزة المحمولة أو الإنترنت اللاسلكي أو اتصال البيانات أو نظام إدارة البيانات Eversense Data Management System (DMS) أو إذا كان جهاز الإرسال الذكي خارج نطاق الجهاز المحمول، أو في حالة شحن جهاز الإرسال الذكي، قد يؤدي ذلك إلى عدم عرض البيانات لأعضاء دائرتك. ينبغي ألا تعتمد على أشخاص يراقبون بيانات الجلوكوز الخاصة بك عن بُعد لمساعدتك في حالة حدث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.

تقدم ميزة المراقبة عن بُعد عرضاً ثانوياً للإشعارات والبيانات لأعضاء دائرتك. فهو ليس نظام مراقبة عن بُعد في الزمن الحقيقي.

الفوائد

قد يوفر نظام Eversense XL CGM المستخدم مع تطبيق Eversense NOW Remote Monitoring لمستخدمي نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة مزيداً من الثقة، وذلك بمعرفة أن الآخرين يمكنهم عرض بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بهم.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق **Eversense NOW** لاتخاذ قرارات علاجية. استخدم دائماً قيم الجلوكوز بالدم من جهاز قياسك لاتخاذ قرارات العلاج. يمكن أن يؤدي استخدام قيمة مستشعر جلوكوز لاتخاذ قرار علاجي إلى جلوكوز مرتفع أو منخفض بالدم. يُعتبر تطبيق **Eversense NOW** شاشة عرض ثانوية لبيانات **Eversense XL CGM** وينبغي عدم استخدامها بدلاً من شاشة **Eversense XL CGM** الرئيسية.
- ينبغي ألا تعتمد على أشخاص يراقبون الجلوكوز لديك عن بُعد لإبلاغك بأحداث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.

تنبيهات



- تطبيق **Eversense NOW** للجهاز المحمول لا يحل محل نظام المراقبة حسب توجيه مزود الرعاية الصحية الخاص بك.
- إذا لم تكن ميزة المزامنة التلقائية **Auto Sync** (الميزة التي تتيح إمكانية إرسال البيانات إلى تطبيق **Eversense NOW** تلقائياً) في وضع التشغيل، فلا يمكنك مشاركة البيانات مع الموجودين في دانرتك ولن يروا اتجاهات وأحداث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.
- إذا لم يكن لديك ولدى أعضاء دانرتك اتصال بالإنترنت، أو إذا توقف تشغيل الجهاز المحمول بسبب انخفاض شحن البطارية أو نفاد الشحن منها، فلا يمكن عرض بيانات **Eversense XL CGM** على تطبيق **Eversense NOW**.
- إذا أوقف أعضاء دانرتك الأصوات على جهازهم المحمول، فلن يتلقوا تنبيهات صوتية بشأن بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بك على تطبيق **Eversense NOW** لديهم.
- إذا ضبطت حالتك على "غير متصل" مع أي من أعضاء دانرتك، فلن يتلقى أيًا من بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بك على تطبيق **Eversense NOW** لديه. لا تضبط حالتك على "غير متصل" إذا كنت تريد أن يرى أعضاء دانرتك بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بك.
- لا يتصل تطبيق **Eversense NOW** مع مستشعر **Eversense XL** و/أو جهاز إرسال **Eversense XL** الذكي بشكل مباشر.
- لا يستطيع تطبيق **Eversense NOW** أن يغير الإعدادات في تطبيق **Eversense XL CGM**.
- إذا لم يسمح مستخدم تطبيق **Eversense NOW** بالإشعارات من التطبيق، فلن يتلقى التنبيهات الخاصة بالجلوكوز منك.
- إذا كان جهازك المحمول مضبوطاً على وضع عدم الإزعاج، فلن تسمع أي إشعارات من تطبيق **Eversense NOW**.

من شاشة **MY CIRCLE** على تطبيق Eversense XL للجهاز المحمول، يمكنك دعوة حتى خمسة أشخاص للاطلاع على بياناتك. عندما تدعو شخصاً لينضم إلى دائرتك، سيتم إرسال دعوة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته. بمجرد قبول الدعوة وتنزيل تطبيق Eversense NOW، يستطيع أعضاء دائرتك الاطلاع على بيانات الجلوكوز وأحداثه وتنبيهاته الأخيرة لديك.

مهم: لن يتمكن أعضاء دائرتك الذين ليس لديهم تطبيق Eversense NOW من رؤية بياناتك.

طالما يكون لدى تطبيق نظام Eversense XL CGM وتطبيق Eversense NOW اتصال بالإنترنت، تجري مزامنة بيانات الجلوكوز لديك مع تطبيق Eversense NOW كل 5 دقائق تقريباً. قد تستغرق قيم المعايير وقتاً أطول في المزامنة مع تطبيق Eversense NOW.

ملاحظة: إذا كنت قد أوقفت تشغيل المزامنة التلقائية، فلن تكون بيانات الجلوكوز الخاصة بك متاحة على تطبيق Eversense NOW للمراقبة عن بُعد.

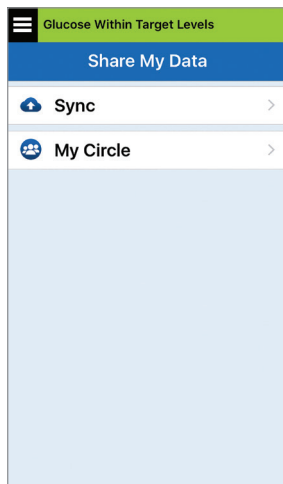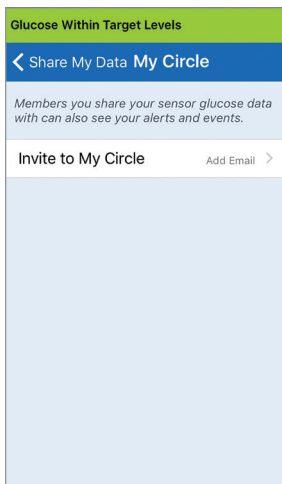

**1. من Main Menu، اضغط على
Share My Data > My Circle
لعرض شاشة
MY CIRCLE.**


**2. لدعوة عضو جديد للاطلاع على بيانات الجلوكوز
الخاصة بك، اضغط على Invite to My Circle.**

3. أدخل البريد الإلكتروني الخاص بالشخص الذي ترغب في دعوته إلى دائرتك، واضغط على **Send** عندما تنتهي.



ملاحظة: يمكنك الضغط على علامة "+" المجاورة لحقل البريد الإلكتروني لتحديد عنوان بريد إلكتروني من قائمة جهات الاتصال لديك.

نصيحة: الألقاب اختيارية وتُستخدم في مساعدتك على التعامل مع أعضاء دائرتك بسهولة. إذا اخترت ألا تعطي لقباً لعضو في الدائرة، فسيظهر عنوان بريده الإلكتروني مكان اللقب.

4. تظهر الشاشة **Invitation Sent**. اضغط على **OK**.



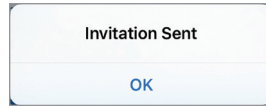


عندما يتم قبول الدعوة، سيظهر اسم العضو في قائمة الأعضاء على شاشة **MY CIRCLE** في تطبيقك.

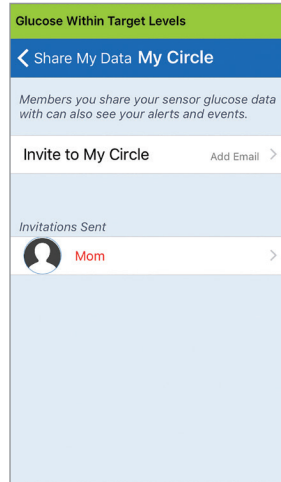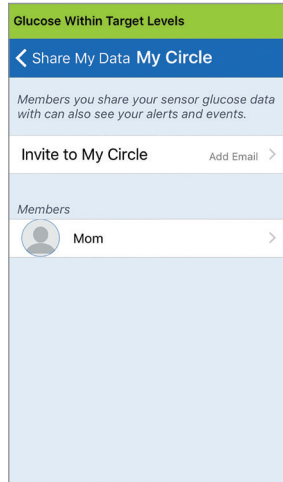


ملاحظة: صور البروفايل لمن يراقبون بيانات الجلوكوز الخاصة بك عن بُعد معتمدة في حساب DMS من قبل مالك الحساب. لا يمكنك تغيير صور البروفايل لمن دعوتهم إلى دائرتك.

2. اضغط على Remove لإخراج العضو من دائرتك. اضغط على Yes عند مطالبتك بذلك.

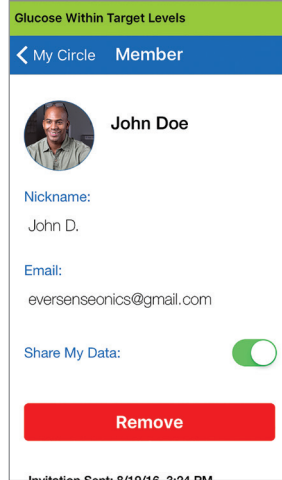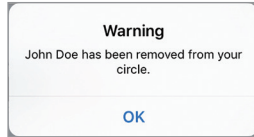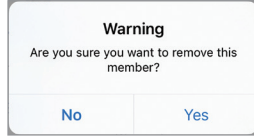


1. لإخراج عضو أو دعوة، اضغط على اسم الشخص في القائمة Members أو القائمة Invitations Sent في الشاشة MY CIRCLE.

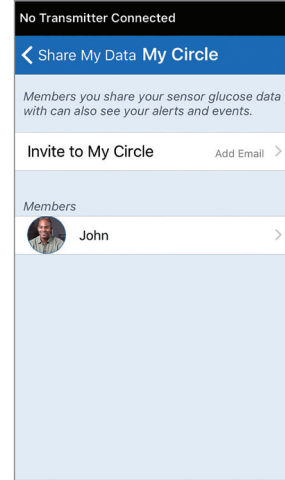


سيتم إخطار العضو الذي تخرجه على تطبيق Eversense NOW لديه إذا كان قد قبل بالفعل.

قد تكون هناك أوقات ترغب فيها في إيقاف مشاركة البيانات مؤقتًا مع أحد الأعضاء، لكن من دون إخراجها من دائرتك.

2. اضغط على الزر Share My Data لتشغيل/إيقاف مشاركة البيانات مع هذا العضو.

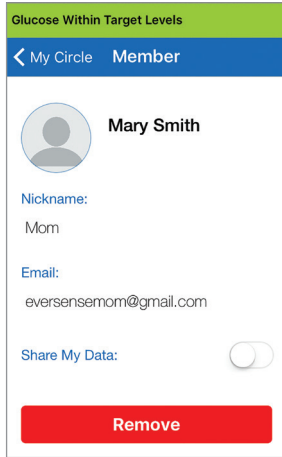

1. اضغط على اسم العضو في القائمة My Circle لفتح الشاشة MEMBER.

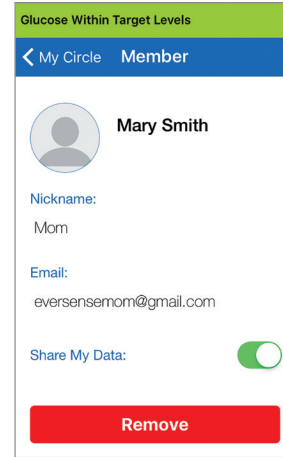


مهم: إذا كنت قد عطلت ميزة Share My Data لأحد الأعضاء، فلن يرى ذلك العضو أيًا من بيانات الجلوكوز أو تنبيهاته أو تاريخ أحداثه في نظام Eversense XL CGM. وسيرى الأعضاء حالتك باعتبارها غير متصلة Offline على تطبيق Eversense NOW عندما تقوم بتعطيل ميزة Share my Data. يمكن أن يستغرق ظهور التغيير مدة تصل إلى 10 دقائق ليظهر على تطبيق مستخدم Eversense NOW.

ملاحظة: يستطيع مستخدم Eversense NOW أيضًا أن يخرجك من تطبيقه. يمكن أن يستغرق ظهور هذه التغييرات مدة تصل إلى ساعتين لتظهر على تطبيق Eversense XL CGM الخاص بك.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول تطبيق Eversense NOW، يرجى زيارة الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com/> أو الاتصال بموزك المحلي.

16. حول المستشعر

يصف هذا القسم مستشعر Eversense XL وكيف يُدخله مزود رعايتك الصحية.

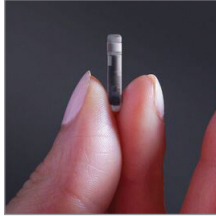

مستشعر Eversense XL

مستشعر Eversense XL عبارة عن مقياس مصغر للتألق يستخدم كثافة الفلورسنت لقياس الجلوكوز في السائل الخلالي. يتم زرع المستشعر تحت الجلد (تحت البشرة) أعلى الذراع مع عدم ترك أي جزء بارز منه خارج الجلد. يظل المستشعر في مكانه ويقدم قياسات مراقبة الجلوكوز المستمرة طوال عمر تشغيل المستشعر.

المستشعر مغلف بمادة متوافقة بيولوجيًا ويستخدم بوليمر فلورسنت فريدًا لبيين الجلوكوز. يعمل صمام ثنائي باعث للضوء مغروس في المستشعر على استثارة البوليمر فيرسل البوليمر إشارة سريعة بالتغيرات في تركيز الجلوكوز عبر إجراء تغيير في انبعاث الضوء. ثم يتم نقل القياس إلى جهاز الإرسال الذكي. تكتمل القياسات تلقائيًا ولا تحتاج إلى إجراء من المستخدم.

يبلغ قياس المستشعر 3.5 مم × 18.3 مم تقريبًا ويتضمن حلقة من السليكون تحتوي على قدر صغير من أسيتات ديكساميثازون وهو دواء ستيرويدي مضاد للالتهابات. يقلل أسيتات ديكساميثازون من الاستجابات الالتهابية المشابهة جدًا لما يحدث مع الأجهزة الطبية الشائعة مثل الناظمات القلبية.

خطوات الإدخال

سيشرح مزود الرعاية الصحية الخاص بك الخطوات البسيطة والسريعة لإدخال المستشعر وينفذها. وستكون يقطاً تماماً أثناء عملية الإدخال التي تستغرق ما يقارب 5 دقائق.

موضع الإدخال:

من المهم أن تختار موضعاً مريحاً لك لارتداء المستشعر وجهاز الإرسال الذكي لمدة تصل إلى 180 يوماً. يوصى بأن تُدخل المستشعر نحو الجانب الخلفي من أعلى الذراع. يقلل وضعه في هذه المنطقة من احتمال اصطدام المستشعر وجهاز الإرسال الذكي بمداخل الأبواب أو الجدران أو الممرات الضيقة الأخرى. تجنب قدر الإمكان المناطق ذات الجلد المتهدل أو التي فيها ندبات أو وشم أو وحة أو أوعية دموية يمكن قطعها أثناء العملية. يوصى بالتبديل بين الزراعين لتوفير مواضع إدخال لاحقة.

الخطوة 1: تجهيز الموضع - سيتم تنظيف موضع الإدخال وتقييمه ثم تخديره باستخدام الليدوكاين.

الخطوة 2: الشق - سيتم عمل شق صغير (أقل من 1 سنتيمتر) في موضع الإدخال.

الخطوة 3: إدخال المستشعر - سيتم عمل جيب تحت الجلد وسيتم إدخال المستشعر في هذا الجيب.

الخطوة 4: إغلاق الموضع - سيتم إغلاق الشق باستخدام Steri-Strips™. الغرز ليست مطلوبة عادة.

الخطوة 5: ربط المستشعر وجهاز الإرسال الذكي - اربط المستشعر وجهاز الإرسال الذكي لتبدأ مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة.

ملاحظة: بعد الإدخال، اربط جهاز الإرسال الذكي مع المستشعر ثم اترك موضع الشق ليتعافى لمدة 24 ساعة قبل إعادة وضع جهاز الإرسال.

يحتاج المستشعر إلى 24 ساعة ليستقر داخل موضع الإدخال، وتُعرف هذه الفترة باسم مرحلة الإحماء. بعد أول 24 ساعة من إدخال المستشعر، ضع جهاز الإرسال الذكي وثبته فوق المستشعر وتأكد من أن لديك اتصالاً. (انظر تثبيت جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر الذي تم إدخاله.) يمكنك بعد ذلك إجراء معايرة مرحلة التهئية باستخدام 4 اختبارات جلوكوز بالدم بوخز الإصبع لتبدأ في الحصول على قراءات الجلوكوز.

خطوات الإخراج

على نفس منوال خطوات الإدخال، سيشرح مزود رعايتك الصحية الخطوات البسيطة والسريعة لإخراج المستشعر، وستكون فقط تمامًا أثناء عملية الإخراج التي تستمر لمدة 5 دقائق (تقريبًا).

الخطوة 1: تجهيز الموضع - سيتم تنظيف موضع المستشعر وتعقيمه ثم تخديره باستخدام الليدوكاين.

الخطوة 2: الشق - سيتم عمل شق صغير (أقل من 1 سنتيمتر) في موضع المستشعر.

الخطوة 3: إخراج المستشعر - سيتم إخراج المستشعر والتخلص منه.

الخطوة 4: إغلاق الموضع - بمجرد الإخراج، سيتم إغلاق الشق باستخدام Steri-Strips™ (قد يتم استخدام غرز على حسب تفضيل المزود).

يصف هذا القسم مشكلات السلامة عند السفر مع جهاز إرسال **Eversense XL** الذكي والمستشعر الخاصين بك.

عند السفر، من الآمن أن يمر جهاز الإرسال الذكي والمستشعر عبر أمن المطار من دون إزتهما. يمكنك إبلاغ الأمن بأن لديك جهازاً طبيّاً مزروعاً.

سيتميز امن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك تلقائياً مع الوقت والتاريخ الحاليين في هاتفك الذكي عند تغيير المناطق الزمنية.

نظام Eversense XL CGM آمن للاستخدام على خطوط الطيران التجارية في الولايات المتحدة. جهاز إرسال Eversense XL الذكي عبارة عن جهاز إلكتروني طبي محمول (M-PED) بمستويات انبعاث موافقة لتوصيات إدارة الطيران الفيدرالية للاستخدام في كل الأوضاع أثناء الطيران. (راجع FAA Advisory, Circular 16G-21# بتاريخ 6.22.2011). للاستخدام، قم بتشغيل ميزة Bluetooth في جهازك المحمول بعد أن تضع جهازك المحمول في وضع الطيران. بالنسبة لرحلات الطيران خارج الولايات المتحدة، اتبع لوائح الأمن المحلية لاستخدام الأجهزة الطبية في رحلات الطيران.

مهم: عند السفر إلى مناطق زمنية مختلفة، راجع إعدادات التنكير بالمعايرة لديك لتضمن أن الأوقات مريحة بالنسبة إليك حسب منطقة التوقيت المحلي.

18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا القسم معلومات عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها في نظام **Eversense XL CGM** ويتضمن قائمة بالأسئلة المتكررة (FAQs).

جهاز الإرسال الذكي

س: كيف أوقف تشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: اضغط باستمرار على زر الطاقة في جهاز الإرسال الذكي لمدة 5 ثوانٍ. حرر الزر عندما يبدأ جهاز الإرسال الذكي في الذبذبة.

س: كيف أقوم بتشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: اضغط باستمرار على زر الطاقة في جهاز الإرسال الذكي لمدة 5 ثوانٍ. حرر الزر عندما يبدأ جهاز الإرسال الذكي في الذبذبة.

س: كيف أضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر بشكل صحيح؟

ج: هناك طريقتان لضمان الوضع الصحيح:

1. عند استخدام الرقعة اللاصقة لتثبيت جهاز الإرسال الذكي، تأكد من أن رمز زر الطاقة ومصباح LED مصطفان بالتوازي مع ذراعك.

2. استخدم الشاشة **PLACEMENT GUIDE** في

التطبيق لتؤكد الاتصال بين المستشعر وجهاز الإرسال.

• اضغط على **Placement Guide**.

• ضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر بحيث يتم تأكيد الاتصال.

س: جهاز الإرسال الذكي الخاص بي لا يصدر ذبذبة. لماذا؟

ج: إذا لم يصدر جهاز الإرسال الذكي ذبذبة، فجرب الخطوات التالية:

• تحقق من اتصال جهاز الإرسال الذكي بجهازك المحمول.

• تحقق من تعطيل وضع **Do Not Disturb** عن

طريق الضغط على **Menu > Settings**

Sound Settings.

• تحقق من أن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك يحتوي على طاقة بطارية كافية واشحنه عند الضرورة.

إذا استمر جهاز الإرسال الذكي بعدم إصدار ذبذبة، فاتصل بدعم العملاء أو الموزع المحلي لديك للمزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

س: هل يمكنني استخدام الرقعة اللاصقة نفسها أكثر من مرة في اليوم؟

ج: ينبغي استخدام رقعة لاصقة جديدة كل مرة عند وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر. الرقعة اللاصقة الفردية معدة للاستخدام لمدة 24 ساعة.

س: ما الرقم التسلسلي ورقم الطراز لجهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: يمكنك العثور على الرقم التسلسلي والطراز على الجانب الخلفي من جهاز الإرسال الذكي. بمجرد أن تقوم بإقران جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول، يمكنك أيضًا العثور على الرقم التسلسلي والطراز عن طريق الضغط على **Menu > About > My Transmitter**.

س: كيف أخصص اسم جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: اضغط على **Menu > Settings > System**. اكتب الاسم الذي ترغب فيه. **Transmitter Name**. سيظهر الاسم الجديد لجهاز الإرسال الذكي على شاشة حالة التوصيل لديك.

س: لماذا يعرض جهاز الإرسال الذكي الخاص بي مصباح LED بلون برتقالي ثابت؟

ج: اتبع الخطوات أدناه لاستكشاف أخطاء جهاز الإرسال الذكي وإصلاحها:

1. تحقق من إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول.

2. تأكد من أن جهاز الإرسال الذكي مشحون.

3. تحقق من تطبيقك تحسبًا لوجود أي تنبيهات أو إشعارات.

4. اخلع جهاز الإرسال الذكي من ذراعك وانتظر لدقائق قليلة.

ستظهر رسالة **No Sensor Detected** وينبغي أن

يصدر جهاز الإرسال الذكي دذبذب بتكرار أكبر أثناء بحثه

عن مستشعر. إذا لم يتذبذب جهاز الإرسال الذكي أو إذا كان

التطبيق لا يعرض رسالة **No Sensor Detected**،

فاتصل بدعم العملاء في الولايات المتحدة. خارج الولايات

المتحدة، اتصل بموزعك المحلي. أعد وضع جهاز الإرسال

الذكي فوق المستشعر لترى ما إذا كان ضوء LED البرتقالي

يختفي وراقب أي إشعارات في التطبيق.

إذا استمر ضوء LED البرتقالي في الظهور، فاتصل بدعم

العملاء.

بطارية جهاز الإرسال الذكي والشحن

س: كم تدوم بطارية جهاز الإرسال الذكي المشحونة بالكامل؟

ج: تدوم بطارية جهاز الإرسال الذكي المشحونة بالكامل لمدة 24 ساعة إلى 36 ساعة.

س: كم يستغرق شحن جهاز الإرسال الذكي؟

ج: يستغرق الشحن الكامل لجهاز إرسال ذكي 15 دقيقة عند توصيله بمنفذ كهرباء في الحائط. قد يستغرق وقتاً أطول إذا كان الشحن عبر منفذ USB في الكمبيوتر أو عندما تكون البطارية فارغة.

س: ما الذي يحدث إذا نفذ شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي الخاص بي تماماً؟

ج: لن تظهر قراءات الجلوكوز. اشحن دائماً على الفور عند نفاد بطارية جهاز الإرسال الذكي بالكامل.

س: كيف أتأكد من حالة بطارية جهاز الإرسال الذكي؟

ج: هناك ثلاث طرق للتحقق من حالة البطارية:

1. اضغط على **Menu > About > My Transmitter**.

قم بالتمرير لأسفل إلى خط مستوى البطارية الذي يبين مقدار شحن البطارية المتبقي.

2. افحص رمز البطارية في الركن العلوي الأيمن على شاشة **MY GLUCOSE**. تشير أيقونة البطارية الحمراء إلى أن بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة.

3. ابدأ تشغيل جهاز الإرسال الذكي. اضغط ضغطة قصيرة على زر الطاقة في جهاز الإرسال الذكي. يشير مصباح LED البرتقالي في جهاز الإرسال الذكي إلى انخفاض شحن البطارية. يشير مصباح LED الأخضر إلى أن شحن البطارية لا يقل عن 10%.

س: من صفحة **About > My Transmitter**، يظهر

مستوى البطارية بنسبة 65% ثم ينخفض إلى 35%.

لماذا حدث ذلك؟

ج: يختلف معدل تفريغ مستويات شحن البطارية بشكل كبير على حسب الاستخدام، فلن يتم تفريغ شحن طراز البطارية نفسه في جهازين بالمعدل نفسه. هذا هو السبب في أننا نعرض مؤشرات مستوى شحن البطارية على هذه الشاشة بزيادات كبيرة: 100% و 65% و 35% و 10% و 0%. يبين اختبارنا أن التنبيه "Low Battery" يظهر بشكل ثابت في النقطة التي لا يزال فيها لدى جهاز الإرسال الذكي حوالي ساعتين من الشحن (عند مستوى المؤشر 10% تقريباً). من المهم شحن بطارتك عندما تتلقى التنبيه "Low Battery".

الاتصال مع جهاز الإرسال الذكي

س: كيف أقوم بإقران جهاز ي المحمول مع جهاز الإرسال الذكي لأول مرة؟

ج: اتبع الخطوات أدناه لإقران جهازك المحمول مع جهاز الإرسال الذكي. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً.

1. ابدأ تشغيل تطبيق Eversense XL.

2. اضغط على زر طاقة جهاز الإرسال الذكي ثلاث مرات لتدخل إلى الوضع "Discoverable".

3. عندما يومض جهاز الإرسال الذكي باللون الأخضر والبرتقالي، اضغط على معرف جهاز الإرسال الذكي في شاشة **CONNECT**. سيبدأ التطبيق عندها في عملية البحث.

• يتطابق معرف جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع الرقم التسلسلي الموجود على الجانب الخلفي من جهاز الإرسال الذكي.

4. عندما يجد التطبيق جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، تظهر

شاشة **BLUETOOTH PAIRING REQUEST** منبثقة.

5. اضغط على **Pair** لتأكيد عملية الإقران.

6. سيعرض التطبيق كلمة **Connected** بجوار معرف جهاز الإرسال الذكي بمجرد اكتمال الإقران.

س: يبدو أن جهاز الإرسال الذكي وجهازي المحمول غير متصلين.

ج: قد تكون هناك عدة أسباب لعدم وجود اتصال لديك.

• تأكد من أن إعداد Bluetooth في جهازك المحمول يعمل وأن اسم جهاز الإرسال الذكي أو رقمه التسلسلي يظهران على قائمة الأجهزة.

• قد تكون الحالة مؤقتة فقط. اضغط على **Menu > Connect**. إذا كان مكتوباً على اسم جهاز الإرسال الذكي الخاص بك كلمة **Disconnected**، فاضغط على اسم جهاز الإرسال الذكي للاتصال يدوياً.

• قد يكون جهاز الإرسال الذكي الخاص بك والجهاز المحمول خارج النطاق اللاسلكي. انقل جهازك المحمول إلى مكان أقرب من جهاز الإرسال الذكي.

• قد يكون جهاز الإرسال الذكي الخاص بك بحالة إيقاف التشغيل أو بدون طاقة بالبطارية أو يجري شحنه حالياً. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل وظيفة Bluetooth (BLE) في جهاز الإرسال الذكي عن طريق اتباع الخطوات أدناه.

1. أوقف تشغيل جهاز الإرسال الذكي - اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ وانتظر الدنبية لتتأكد من توقف تشغيله.

2. انتظر ثانيتهين واضغط على زر الطاقة ثلاث مرات لكي تعيد تشغيل وظيفة BLE. (ملاحظة: عند إعادة تشغيل وظيفة BLE، لا تقم بإزالة/نسيان الجهاز المقترن عبر إعدادات Bluetooth في جهازك المحمول.)

3. اضغط على زر الطاقة 3 مرات مرة أخرى لتضع جهاز الإرسال الذكي في الوضع القابل للاكتشاف وقم بإقرانه بجهازك المحمول. اضغط على **Menu > Connect** لترى ما إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك متصلاً. إذا لم يكن متصلاً، فاضغط لتحديد جهاز الإرسال الذكي الخاص بك من القائمة.

إذا كانت هذه الخطوات لا تحل المشكلة، فقد تحتاج الانتقال إلى ميزة إعدادات Bluetooth في جهازك المحمول وإلغاء الاقتران أو نسيان جهاز الإرسال الذكي ومن ثم الضغط على زر طاقة جهاز الإرسال الذكي 3 مرات لإعادة الإقران. وإذا ظلت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين جهاز الإرسال الذكي لديك.

س: كيف أعيد ضبط جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟
ج: اتبع الخطوات أدناه.

1. ضع جهاز الإرسال الذكي في حامل الشحن وقم بتوصيل كابل USB. قم بتوصيل الكابل في منفذ الكهرباء في الحائط. (يمكنك أيضاً توصيل طرف USB القياسي بالكابل بمنفذ USB في الكمبيوتر مباشرة.)

2. اضغط باستمرار على زر الطاقة (لمدة 14 ثانية تقريباً) في جهاز الإرسال الذكي أثناء التوصيل بـ USB. حرر زر الطاقة.

3. سيبدأ مصباح LED في الوميض خلال ثانيتهين تقريباً ليبين أن جهاز الإرسال الذكي يمر عبر تسلسل اختبار ذاتي. سيومض مصباح LED بعدة ألوان. بمجرد اكتمال الاختبار الذاتي، سيصدر جهاز الإرسال الذكي دذبذبة ويستمر ظهور ضوء أخضر أو برتقالي ثابت لمصباح LED.

4. إذا لم يكتمل الاختبار الذاتي، فكرر الخطوات من 1 إلى 3.
5. إذا اكتملت الخطوة 3 بنجاح، يصبح جهاز الإرسال الذكي مستعداً الآن للاستخدام.

6. افصل جهاز الإرسال الذكي من كابل USB وتابع الإقران. بمجرد الإقران، سيكون النظام في مرحلة التهيئة. إذا كنت لا تستطيع إكمال إعادة الضبط، فاتصل بدعم العملاء.

س: هل يستطيع آخرون الاتصال بجهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: يستخدم نظام Eversense XL CGM اتصال Bluetooth آمناً ولن يسمح لآخرين بالاتصال.

س: ماذا يحدث إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بي غير متصل بجهازي المحمول أو التطبيق؟

ج: سيصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبية وسيعرض التطبيق الإشعار "Transmitter Disconnected" كل 30 ثانية إلى أن يبدأ تشغيل التطبيق أو يعاد توصيل جهاز الإرسال الذكي. بمجرد إعادة إنشاء الاتصال، ستتزامن البيانات التي تم جمعها مع تطبيق الهاتف المحمول.

س: لماذا لا أستطيع توصيل جهازي المحمول مع جهاز الإرسال الذكي الخاص بي (تظهر عبارة **No Transmitter Connected** في شريط الحالة في التطبيق)؟

ج: قد يفشل جهاز الإرسال الذكي في الاتصال مع جهازك المحمول لأي من الأسباب التالية:

- جهاز الإرسال الذكي يشحن حاليًا.
- تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي.
- شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي نفذ تمامًا.
- تم إيقاف تشغيل Bluetooth في جهازك المحمول.
- لم يتم إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول أو تم "إلغاء إقرانه". يجب أن تعيد إنشاء الإقران. انظر استكشاف الأخطاء وإصلاحها للاطلاع على المزيد من المعلومات.

س: لماذا أرى كلمة **Searching** على شاشة **CONNECT**؟

ج: سيواصل التطبيق عرض كلمة **Searching** لأي من الأسباب التالية:

- جهاز الإرسال الذكي يشحن حاليًا.
- تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي.
- شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي نفذ تمامًا.
- تم إيقاف تشغيل Bluetooth في جهازك المحمول.
- لم يتم إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول أو تم "إلغاء إقرانه". يجب أن تعيد إنشاء الإقران.

س: ما هو وضع "Discoverable" (الإقران)؟

ج: الوضع القابل للاكتشاف Discoverable هو حالة جهاز الإرسال الذكي التي تتيح إمكانية تحديد موقعه عن طريق جهازك المحمول لإقرانه. انظر بدء التشغيل للاطلاع على المزيد من المعلومات.

س: لماذا أرى أجهزة إرسال ذكية أخرى مدرجة على شاشة CONNECT؟

ج: إذا كان هناك مستخدمون آخرون لنظام Eversense CGM قريبين منك، فقد يجد التطبيق تلك الأجهزة. إلا أن التطبيق لا يتصل إلا مع جهاز الإرسال الذكي الذي تم إقرانه مع جهازك المحمول. لا تحاول إقران جهازك المحمول مع أجهزة إرسال ذكية أخرى لا تخصك.

س: جهاز الإرسال الذكي الخاص بي ليس مدرجًا على شاشة CONNECT؟

ج: لن يكون جهاز الإرسال الذكي مدرجًا على شاشة CONNECT لأي من الأسباب التالية:

- جهاز الإرسال الذكي يشحن حاليًا عبر USB.
- تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي.
- شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي نفذ تمامًا.
- تم إيقاف تشغيل Bluetooth في جهازك المحمول.
- لم يتم إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول أو تم "إلغاء إقرانه". يجب أن تعيد إنشاء الإقران.

س: تلقيت للتو جهاز إرسال ذكي جديد. كيف أُلغي ربط الجهاز القديم وأربط الجديد بمستشعري؟

ج: في Main Menu، اضغط على **Connect**. اضغط باستمرار على اسم جهاز الإرسال الذكي القديم الخاص بك. اضغط على **OK** لمنع التطبيق من الاتصال تلقائيًا بجهاز الإرسال الذكي القديم. اتبع الخطوات الواردة في دليل المستخدم هذا لإقران جهاز الإرسال الذكي الجديد مع التطبيق وربطه بمستشعرك.

المعايرة

س: هل يؤثر إجراء أكثر من معايرتين بوخز الإصبع في اليوم على دقة النظام؟

ج: لن تتأثر الدقة سلباً إذا أجريت أكثر من المعايرتين المطلوبتين في اليوم.

س: لماذا ينبغي أن أجري اختباراً بوخز الإصبع باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم؟

ج: ينبغي عليك إجراء اختبار جلوكوز الدم باستخدام جهاز قياس:

- عندما يحين وقت المعايرة.
- عندما لا تستطيع الحصول على قراءات مستشعر الجلوكوز.
- في أي وقت تصل فيه إلى الحدين السفلي أو العلوي للتنبيه الجلوكوز.
- في أي وقت تشعر فيه بأعراض انخفاض الجلوكوز بالدم أو ارتفاعه.
- في أي وقت لا تكون فيه أعراضك متسقة مع قراءات مستشعر الجلوكوز.
- قبل اتخاذ قرارات علاجية، مثل تحديد جرعة الأنسولين أو استهلاك الكربوهيدرات.

س: لماذا لا أستطيع إجراء المعايرة؟

ج: قد لا تتمكن من إجراء المعايرة لأي من الأسباب التالية:

- عدم جمع ما يكفي من بيانات الجلوكوز من المستشعر، وهو ما قد يستغرق مدة تصل إلى 5 دقائق.
- تتغير قيم الجلوكوز من المستشعر بسرعة، كما يحدث بعد الأكل أو أخذ الأنسولين.
- انخفاض قراءة جلوكوز الدم عن 40 mg/dL.
- ارتفاع قراءة جلوكوز الدم لأعلى من 400 mg/dL.
- أخذ قراءة جلوكوز الدم قبل أكثر من 10 دقائق على إدخالها في تطبيق Eversense XL.
- اختلاف آخر قيمة من مستشعر الجلوكوز بشكل كبير عن قراءة جلوكوز الدم التي تم إدخالها.
- لم يحن وقت إجراء معايرتك.

س: كيف أقوم بتغيير أوقات المعايرة اليومية التي حددتها صباحاً ومساءً؟

ج: اضغط على **Menu > Settings > Daily**

Calibration. حدد وقت الصباح أو المساء لتغييره. يجب تعيين وقتي الصباح والمساءً بفواصل زمني بينهما لا يقل عن 10 ساعات ولا يزيد عن 14 ساعة.

س: لماذا رُفِضت معايرتي؟

ج: سيرفض النظام المعايرة لأي من الأسباب التالية:

- انخفاض قراءة جلوكوز الدم التي تم إدخالها لأقل من 40 mg/dL.
- ارتفاع قراءة جلوكوز الدم التي تم إدخالها لأعلى من 400 mg/dL.
- اختلاف قراءة جلوكوز الدم التي تم إدخالها كثيرًا عن آخر قراءة من قراءات مستشعر الجلوكوز.
- إذا تم رفض المعايرة، يجب عليك إعادة إجراء المعايرة.
- قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 60 دقيقة قبل إعادة إجراء المعايرة.

س: هل يمكنني إجراء المعايرة قبل الوقت المحدد للمعايرة؟

ج: يمكنك إجراء المعايرة قبل الوقت المحدد بمدة تصل إلى ساعتين. إذا فاتك الوقت المحدد، فسيرسل النظام طلب معايرة كل ساعة. للاطلاع على وقت المعايرة المتاح التالي، اضغط على **Menu < Calibrate**. يظهر الوقت المحدد التالي للمعايرة.

س: ما الوقت الذي ينبغي إدخاله في شاشة **CALIBRATE** عند إبلاغي بإجراء المعايرة؟

ج: أدخل الوقت الذي أجريت فيه اختبار الجلوكوز بالدم باستخدام جهاز القياس الخاص بك. ويجب عليك إدخال قراءة جلوكوز الدم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار.

س: أين يمكنني العثور على تفاصيل مرحلة المعايرة وعدد عمليات المعايرة وتاريخ آخر معايرة ووقتها؟

ج: يمكنك الاطلاع على تفاصيل المعايرة عن طريق الضغط على **Menu > About > My Transmitter**.

س: ما الأنواع المختلفة لمراحل المعايرة؟

ج: ينطوي نظام Eversense XL CGM على نوعين من مراحل المعايرة، مرحلة التهيئة ومرحلة المعايرة اليومية. تبدأ مرحلة التهيئة 24 ساعة بعد إدخال المستشعر وتحتاج إلى 4 من اختبارات الجلوكوز بالدم بوخز الإصبع للمعايرة. تأتي مرحلة المعايرة اليومية بعد مرحلة التهيئة وتحتاج إلى عمليتي معايرة يوميًا (صباحًا ومساءً) طوال عمر المستشعر.

التنبهات والإشعارات

س: هل يمكنني تغيير نمط التنبيه بالذبذبة في جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: أنماط ذبذبة جهاز الإرسال الذكي ثابتة ولا يمكن تغييرها. يمكن تغيير الفاصل الزمني للتكرار لبعض التنبيهات من **Settings < Sound Settings**.

س: هل يمكنني زيادة مستوى أصوات التطبيق الصادرة من جهازي المحمول؟

ج: يمكنك زيادة مستوى أصوات التطبيق عن طريق توصيل جهازك المحمول بجهاز خارجي لتكبير الصوت.

س: كيف أسكت صوت تنبيهات الجلوكوز؟

ج: يمكن إسكات صوت تنبيهات الجلوكوز عن طريق تأكيد التنبيه على جهازك المحمول واتخاذ الإجراء الملائم عند الضرورة.

س: هل يمكنني تغيير عدد التنبيهات التي أتلقها؟

ج: إذا كنت تشعر أنك تتلقى تنبيهات كثيرة جدًا، ينبغي أن تتناقش إعدادات التنبيهات الأنسب لك مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك أولاً. إذا كنت بحاجة إلى تغيير إعدادات تنبيه الجلوكوز الخاصة بك، فاضغط على **Menu > Settings > Glucose**.

س: ما الفرق بين الإشعار والتنبيه؟

ج: الإشعار عبارة عن رسالة غير حرجية ومنخفضة الأولوية (مثل التذكير بالمعايرة).

أما التنبيه فهو رسالة مهمة تحتاج إلى انتباهك وقد تتطلب منك استجابة/اتخاذ إجراء.

س: ما المقصود بتنبيهات معدل التغير؟

ج: تنبيهك بتنبيهات معدل التغير عندما تهبط مستويات الجلوكوز لديك أو ترتفع بمعدل أسرع من الإعداد الذي أدخلته في **Settings > Glucose**. ينبغي عليك إجراء اختبار جلوكوز بالدم بوخز الإصبع فوراً للتأكد من قيمة الجلوكوز لديك.

س: ما الذي يحدث للإشعارات إذا كان تطبيقي غير متصل بجهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: إذا كان التطبيق غير متصل بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك، لكذلك كنت ترتدي جهاز الإرسال الذكي على المستشعر، فسيتم إرسال التنبيهات التي تم تلقيها أثناء ذلك الوقت إلى التطبيق بمجرد إعادة توصيله ومزامنته مع جهاز الإرسال الذكي.

س: لماذا لا أستطيع أن أرى الإشعارات عندما يكون التطبيق في الخلفية؟

ج: راجع تعليمات جهازك المحمول لتقوم بتمكين الإشعارات في الخلفية.

س: كيف يمكنني تصنيف الإشعارات في شاشة ALERT HISTORY؟

ج: تحتوي شاشة **ALERT HISTORY** على فلتر تصنيف بالأعلى. يمكنك التصنيف حسب مستويات الشدة (الأصفر والأزرق) ونوع التنبيه. اضغط على أيقونة فلتر التصنيف المرغوب فيه.

س: ما المقصود بالتنبيهات التنبيهية؟

ج: تنبيه التنبيهات التنبيهية مسبقاً إلى حدث من المرجح حدوثه إذا استمرت الاتجاهات الحالية. تستخدم التنبيهات التنبيهية مستويات التنبيه بانخفاض الجلوكوز وارتفاعه التي تضبطها لتحديد وقت ظهور التنبيهات التنبيهية. يمكنك ضبط التنبيهات لتنذر 10 دقائق أو 20 أو 30 دقيقة قبل الوقت الذي يتوقع فيه نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة أن تصل إلى مستويات التنبيه التي حددتها. وسيصدر جهاز الإرسال الذكي الخاص بك دذبذبة وسيصدر تطبيقك صوت تنبيه ويعرض رسالة على شاشة **MY GLUCOSE** لإبلاغك بتوقع ارتفاع الجلوكوز أو انخفاضه. ينبغي عليك إجراء اختبار جلوكوز بالدم بوخز الإصبع فوراً للتأكد من قيمة الجلوكوز لديك.

س: كيف أسكت صوت تنبيهات الجلوكوز؟

ج: يمكن إسكات صوت تنبيهات الجلوكوز عن طريق تأكيد التنبيه على جهازك المحمول واتخاذ الإجراء الملائم عند الضرورة.

قراءات الجلوكوز

س: لماذا تختلف قراءة المستشعر الخاص بي عن قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم؟

ج: يقيس نظام Eversense XL CGM الجلوكوز في السائل الخلالي (ISF) بين خلايا الجسم. قد تؤدي الاختلافات الفسيولوجية بين السائل الخلالي والدم المأخوذ من وخز الإصبع إلى اختلافات في قياسات الجلوكوز. تظهر هذه الاختلافات بشكل خاص في أوقات التغير السريع في الجلوكوز بالدم (مثل ما يحدث بعد الأكل أو أخذ جرعة الأنسولين أو ممارسة التمارين). في المتوسط، تتأخر مستويات الجلوكوز في السائل الخلالي خلف مستويات الجلوكوز في الدم بعدة دقائق.

س: أتلقي --- -- -- بدلاً من قراءات مستشعر الجلوكوز في التطبيق.

ج: قد لا تحصل على أي من قراءات مستشعر الجلوكوز عندما لا يكون هناك اتصال بين جهاز الإرسال الذكي الخاص بك والمستشعر أو بين جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول. كما قد لا تتلقى أي قراءات عند تنشيط أحد التنبيهات الواردة أدناه:

• No sensor detected

• قراءة مستشعر الجلوكوز Out of Range High أو Out of Range Low.

• Low Sensor Temperature

• High Ambient Light

أسهم الاتجاهات

س: أسهم الاتجاهات وتنبيهات الجلوكوز لدي لا يتطابقان.

ج: تبين أسهم الاتجاهات معدل التغير في مستويات الجلوكوز واتجاهه. على سبيل المثال، قد يكون لديك سهم اتجاه يشير لأعلى أو لأسفل (مما يوضح وجود تغيرات بطيئة أو سريعة). تنذرك تنبيهات الجلوكوز عندما يصل مستوى الجلوكوز الحالي لديك إلى مستوى التنبيه الذي حددته، بغض النظر عن معدل التغير أو اتجاهه.

س: سهم الاتجاه الخاص بي لونه رمادي وليس أزرق.

ج: يستخدم نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة آخر 20 دقيقة من بيانات الجلوكوز المستمرة لحساب سهم الاتجاه وعرضه. عند عدم توافر قيم مستشعر كافية لإجراء الحساب، يظهر السهم باللون الرمادي.

• Sensor Check

• High Smart Transmitter Temperature

• High Sensor Temperature

• Empty Battery

• Calibration Past Due

• New Sensor Detected

• Sensor Replacement

• Calibration Expired

• Smart Transmitter Error

• تنبيه Sensor Suspend

يرجى اتباع التعليمات المذكورة في رسالة الإشعار لمسح التنبيه.

س: ماذا سيحدث إذا أعدت تثبيت التطبيق؟

ج: عند إعادة تثبيت التطبيق، سيقوم التطبيق بتنزيل البيانات التاريخية من آخر 3 أيام فقط.

س: ما إصدار التطبيق المثبت على جهازي المحمول؟

ج: يمكنك العثور على إصدار برنامج التطبيق عن طريق الضغط على **Menu > About > Product Information**.

س: كيف سيتم تحديث تطبيقي؟

ج: تفضل بزيارة الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com/> للتعليمات المتعلقة بتحديث برنامج التطبيق.

س: ما الأجهزة المتوافقة مع تطبيق Eversense XL؟

ج: تفضل بزيارة الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility> للاطلاع على قائمة بالأجهزة المتوافقة.

س: هل ما زال بإمكانني استخدام جهاز الإرسال الذكي نفسه إذا انتقلت إلى جهاز محمول جديد؟

ج: ستحتاج إلى تثبيت التطبيق على جهازك المحمول الجديد وإقرانه مع جهاز الإرسال الذكي الخاص بك. ستتم مزامنة آخر 3 أيام من البيانات التاريخية مع التطبيق على الجهاز المحمول الجديد.

س: هل يمكنني حذف حساب Eversense الخاص بي؟

ج: إذا قمت بحذف حسابك، فسيكون حذفًا نهائيًا، ولن تستطيع الوصول إلى بيانات CGM الخاصة بك على تطبيق Eversense للهاتف المحمول، أو على حساب Eversense DMS الخاص بك. إذا كنت تستخدم تطبيق Eversense NOW للهاتف المحمول، فلن تتمكن من عرض بيانات Eversense CGM عن بُعد بعد الآن. لا يمكنك استخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني لإنشاء حساب جديد. لبدء عملية حذف الحساب، انقر فوق **Delete Account** في صفحة تسجيل الدخول.

س: ما المقصود بخيار Do Not Disturb؟

ج: عند تمكين Do Not Disturb في إعدادات تطبيق Eversense XL App، سيتوقف تطبيق الهاتف المحمول عن عرض التنبيهات غير الحرجة. كما سيتوقف جهاز الإرسال الذكي عن تقديم التنبيهات بالذبذبة بالنسبة للتنبيهات غير الحرجة. وسيستمر توفير التنبيهات الحرجة عبر جهاز الإرسال الذكي وتطبيق الهاتف المحمول.

لاحظ أن ميزة عدم الإزعاج Do Not Disturb في هاتفك الذكي تغطي على خيار Do Not Disturb في التطبيق. لذلك؛ إذا كانت ميزة عدم الإزعاج Do Not Disturb في هاتفك الذكي قيد التشغيل، فلن تتلقى التنبيهات على جهاز الإرسال الذكي أو في التطبيق.

انتبه إلى أن بعض التطبيقات قد تقوم بتمكين ميزة عدم الإزعاج Do Not Disturb على هاتفك تلقائيًا.

س: لماذا يعرض شريط الحالة لـ "syncing"؟

ج: ستظهر كلمة "syncing" في شريط الحالة عندما يتصل جهازك المحمول بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك.

المستشعر

س: هل يمكن إدخال المستشعر في مكان آخر في الجسم غير أعلى ذراعي؟

ج: تم اختبار نظام Eversense XL CGM على أعلى الذراع فقط في الدراسات السريرية.

س: أين يمكنني العثور على الرقم التسلسلي للمستشعر؟

ج: يمكنك الاطلاع على الرقم التسلسلي للمستشعر عن طريق الضغط على **Menu > About > My Sensor**.

س: لماذا أرى الإشعار "New Sensor Detected"؟

ج: تظهر هذه الرسالة عندما يكتشف جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مستشعراً جديداً وبذلك يمكنك ربط جهاز الإرسال الذكي مع المستشعر. يمكن ربط جهاز الإرسال الذكي مع مستشعر واحد فقط في كل مرة. إذا رأيت رسالة **New Sensor Detected** ولديك مستشعر تم إدخاله بالفعل ووربطه مع جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، فاضغط على **Not Now**. إذا لم تكن متأكداً، فاتصل بدعم العملاء للحصول على المزيد من المعلومات.

س: لقد ربطت للتو مستشعراً مع جهاز الإرسال الذكي لأول مرة، لكن تاريخ و/أو وقت الإدخال لا يظهران عندما أضغط على **My Sensor < About**.

ج: قد يستغرق اكتمال عملية الربط مدة تصل إلى 10 دقائق. احرص على أن يكون جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر. تأكد من أن شاشة **LINKED SENSOR** تعرض علامة لتأكيد اكتمال عملية الربط **Linking Process Complete**. انتقل إلى شاشة **MY GLUCOSE** وانتظر لمدة دقيقتين تقريباً. ارجع إلى شاشة **MY SENSOR**. إذا لم يتم عرض تاريخ ووقت الإدخال الصحيحين، فاتبع هذه الخطوات:

1. قم بفك جهاز الإرسال الذكي من موضع الإدخال. قم

بتوصيله بكابل الشحن ومصدر الطاقة. قم بتوصيل مصدر الطاقة بمنفذ الكهرباء في الحائط ثم افصله وفكه من كابل الشحن.

2. أعد وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر. انتقل

إلى **About > My Sensor** وتأكد من صحة تاريخ الإدخال ووقته. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.

س: لقد ربطت للتو مستشعراً مع جهاز الإرسال الذكي لكن صفحة **About > My Transmitter** لا تعرض المرحلة الراهنة الصحيحة.

ج: قد يستغرق اكتمال عملية الربط مدة تصل إلى 10 دقائق. احرص على أن يكون جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر. تأكد من أن شاشة **LINKED SENSOR** تعرض علامة لتأكيد اكتمال عملية الربط **Linking Process Complete**. انتقل إلى شاشة **MY GLUCOSE** وانتظر لمدة دقيقتين تقريباً. ارجع إلى شاشة **MY SENSOR**. إذا بقيت المرحلة الراهنة الصحيحة غير معروضة، فاتبع هذه الخطوات:

1. قم بفك جهاز الإرسال الذكي من موضع الإدخال.
2. قم بتوصيله بكابل الشحن ومصدر الطاقة.
3. قم بتوصيل مصدر الطاقة بمنفذ الكهرباء في الحائط ثم افصله وفكه من كابل الشحن.
4. أعد وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر.

5. انتقل إلى **About > My Transmitter** وقم بتأكيد صحة المرحلة الراهنة. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.

س: لماذا يدخل نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة إلى مرحلة التهيئة مرة أخرى؟

ج: ستعود الدخول إلى مرحلة التهيئة لأي من الأسباب التالية:

- انتهاء فترة المعايرة من دون أن تقوم بإدخال قيمة اختبار بوخز الإصبع.
- اختلاف 3 أو أكثر من قراءات جلوكوز الدم بشكل كبير عن قراءات مستشعر الجلوكوز الحالية.
- عدم شحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك خلال 16 ساعة من تنبيه نفاذ شحن البطارية.
- إذا قمت بتغيير الوقت يدوياً في جهازك المحمول، فإن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك سيقوم بالزمانة وبدء التشغيل من جديد مع جهازك المحمول.

س: هل من المقبول لفني التصوير بالرنين المغناطيسي أن يرتدي نظام **Eversense CGM**؟

ج: نعم. لا يمكن استعمال المستشعر وجهاز الإرسال الذكي من Eversense لمن يخضعون لتصوير بالرنين المغناطيسي.

الأحداث

س: كيف يمكنني تصنيف أحداثي على شاشة

؟EVENT LOG

ج: تتضمن شاشة **EVENT LOG** فلتر تصنيف بأعلى الشاشة. اضغط على أيقونة فلتر التصنيف المرغوب فيه لإدراج الأحداث واستبعادها من القائمة. خيار التصنيف الافتراضي هو عرض كل الأحداث.

المزامنة

س: لماذا أرى أحياناً شريط تقدم باللونين الأزرق والأبيض على أعلى الشاشة؟

ج: سترى شريط تقدم المزامنة هذا لعدة أسباب.

- كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك خارج نطاق مستشعرك لفترة ويقوم بإعادة المزامنة.
- أغلقت تطبيق Eversense XL App تمامًا وأعدت تشغيله.
- فقد جهازك المحمول شحن البطارية وأعيد شحنه.
- يجري رفع بياناتك إلى حسابك على Eversense DMS.

الاختصارات

س: هل هناك طريقة لتحديد تاريخ لعرضه على شاشة

MY GLUCOSE بدلاً من التمرير للخلف؟

ج: نعم، اضغط على شريط "Today" الموجود فوق الرسم البياني مباشرة. ستظهر نافذة منبثقة لكي تحدد فيها التاريخ المرغوب في عرضه على الرسم البياني.

س: إذا كنت أستعرض تاريخاً/وقتاً في الماضي على شاشة

MY GLUCOSE، هل هناك اختصار يعيدني إلى التاريخ والوقت الحاليين؟

ج: نعم، اضغط على قيمة الجلوكوز/سهم الاتجاه للعودة إلى التاريخ/الوقت الحالي على شاشة MY GLUCOSE.

س: هل هناك اختصار للوصول إلى شاشة ALERT HISTORY؟

ج: إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك متصلاً بالتطبيق، فيمكنك الضغط على شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة لعرض شاشة **ALERT HISTORY**.

س: هل هناك اختصار للوصول إلى شاشة CONNECT؟

ج: إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك غير متصل بالتطبيق، ف عندما تضغط على شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة، تظهر شاشة **CONNECT**.

س: هل هناك اختصار لإدخال حدث مثل الوجبات أو التمارين؟

ج: في شاشة MY GLUCOSE اضغط على الرسم البياني لعرض شاشة **EVENT ENTRY**.

19. أداء الجهاز

يسرد هذا القسم ميزات أداء الجهاز.

الأداء في الدراسة السريرية ونظرة عامة عليها

تم إجراء تقييم لسلامة نظام Eversense CGM وفعاليته في عدة دراسات استباقية للجدوى ودراسات محورية. تم إجراء ثلاث دراسات محورية رئيسية في أوروبا والولايات المتحدة: PRECISE وPRECISE II وPRECISION. وضعت هذه الدراسات تقييمًا لأداء نظام Eversense CGM من حيث السلامة والفعالية. تم إجراء تقييمات الدقة في عدة نقاط أثناء الدراسات وطلب من الخاضعين للدراسة أن يبلغوا عن أي أحداث مناوئة طوال الدراسات. تم تحليل الدراستين PRECISE II وPRECISION باستخدام البرنامج المحدث لنظام الحلول الحسابية 602.

الدراسة PRECISE

تم إجراء تقييم لأداء نظام Eversense CGM في دراسة سريرية متعددة المواقع غير عشوائية. تم إدراج مرضى بالغين مصابين بالسكري (بعمر 18 سنة وأكبر) في 7 مراكز مختلفة في 3 بلدان مختلفة. تم إدخال مستشعرين منفصلين لدى كل خاضع للدراسة، حيث تم إدخال واحد في أعلى كل ذراع. تم استخدام أحد المستشعرين لعرض بيانات الجلوكوز على الجهاز المحمول الخاص بالشخص الخاضع للدراسة وتم استخدام المستشعر الآخر في جمع بيانات الجلوكوز لكن لم يتم عرضها على الخاضع للدراسة. جرت متابعة ثلاثة وعشرين (23) خاضعًا للدراسة لمدة 180 يومًا بعد إدخال المستشعر. بلغ متوسط الفارق النسبي المطلق (MARD) الذي تم قياسه طوال 180 يومًا 11.1% لقيم الجلوكوز التي تزيد على 75 mg/dL و11.6% لقيم الجلوكوز التي تتراوح بين 40 و400 mg/dL.

تحليل شبكة الأخطاء من كلارك

تحليل شبكة الأخطاء (EGA) من كلارك واحد من معايير التحديد الكمي لدقة نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة.


يُقاس تحليل EGA من كلارك الدقة عن طريق مقارنة قيم الجلوكوز لدى الشخص الخاضع للبحث والمأخوذة من نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة لديه بالقيم المرجعية المأخوذة من معمل.

يحسب تحليل EGA من كلارك الدقة عن طريق النظر إلى عدد ونسبة نقاط البيانات التي وقعت ضمن 5 مناطق "خطر سريري". يتم عرض البيانات على شكل رسوم بيانية ومخططات.

- **المنطقة أ** (لا يوجد خطر) تحتوي على قيم مراقبة الجلوكوز المستمرة التي وقعت ضمن $\pm 20\%$ من القيم المرجعية.
- تُعتبر قيم المنطقة أ ضمن نطاق الدقة المقبول لنظم مراقبة الجلوكوز المستمرة.
- **المنطقة ب** (لا يوجد خطر) تحتوي على قيم مراقبة الجلوكوز المستمرة التي وقعت خارج $\pm 20\%$ من القيم المرجعية.
- لا تُعتبر قيم المنطقة B ضمن نطاق الدقة المقبول لكن اختلافها عن القيم المرجعية لن يؤدي بالشخص الخاضع للدراسة إلى اتخاذ قرار غير ملائم بالعلاج.
- **المنطقة ج** (منخفضة الخطر) تحتوي على قيم مراقبة الجلوكوز المستمرة التي اختلفت بما يكفي عن القيم المرجعية بحيث قد يتخذ شخص خاضع للبحث قراراً علاجياً غير ضروري بناء على معلومات مراقبة الجلوكوز المستمرة.
- **المنطقة د** (خطر متوسط) تتضمن قيم مراقبة الجلوكوز المستمرة التي تم تحديدها بطريقة صحيحة على أنها انخفاض أو ارتفاع في مستوى السكر عن طريق النظام المرجعي وليس نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة.
- من المحتمل أن يكون الخطأ في تحديد قيمة مراقبة الجلوكوز المستمرة في صورة انخفاض أو ارتفاع في مستوى السكر موقفاً خطيراً.
- **المنطقة هـ** (الخطر المرتفع) تحتوي على قيم مراقبة الجلوكوز المستمرة التي تم تحديدها بشكل غير صحيح باعتبارها انخفاضاً في سكر الدم بينما حددها النظام المرجعي بشكل صحيح باعتبارها ارتفاعاً في سكر الدم (والعكس).
- تحديد قيمة لمراقبة الجلوكوز المستمرة بشكل خاطئ باعتبارها انخفاضاً في سكر الدم بينما هي فعلياً ارتفاعاً في سكر الدم (أو العكس) قد يكون وضعاً خطيراً.

مخطط التشتت لشبكة الأخطاء من كلارك

تم حساب النسب المئوية لشبكة أخطاء كلارك باستخدام نطاق الجلوكوز وذلك عند نقاط معينة في "مدة الارتداء" في الدراسة.

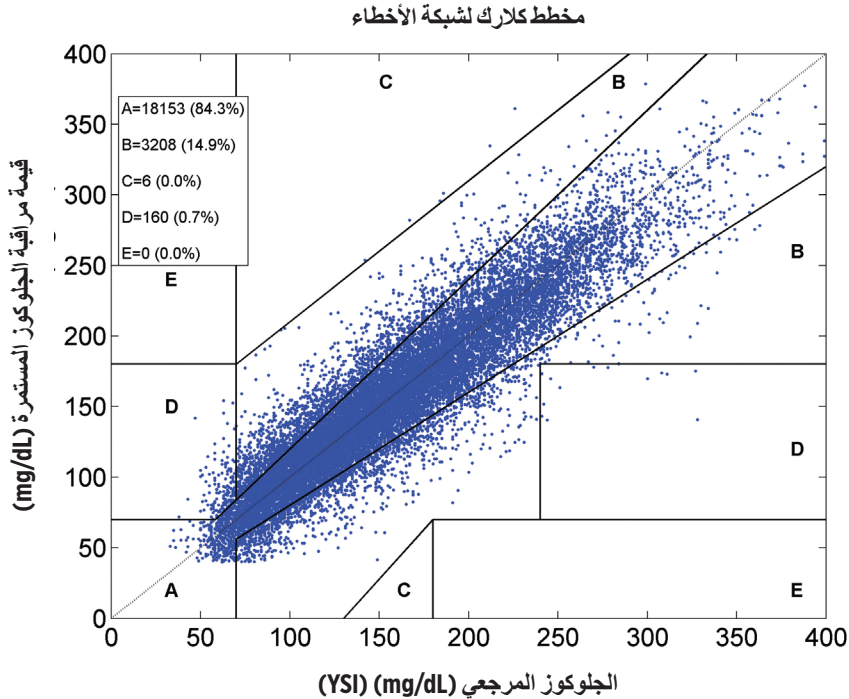

وإجمالاً، وقعت نسبة 99.2% من قراءات مراقبة الجلوكوز المستمرة ضمن المنطقتين "A" و "B". يبين هذا أن قراءات مراقبة الجلوكوز المستمرة كانت متوافقة بشدة مع القيم المرجعية في الأغلبية العظمى من القراءات.

أداء المعايرة

ينظر أداء المعايرة فيما إذا كانت الدقة تتأثر بمقدار الوقت المنقضي منذ آخر معايرة للنظام باستخدام قيمة الجلوكوز بالدم.

أداء نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة حسب الزمن منذ آخر معايرة

النسبة المئوية ضمن 40%	النسبة المئوية ضمن 30%	النسبة المئوية ضمن 20%	عدد قراءات مراقبة الجلوكوز المستمرة-YSI المقترنة	الوقت المنقضي من المعايرة
97.2%	93.7%	84.5%	11324	0 - 4 ساعات
97.9%	94.9%	85.1%	5743	4 - 8 ساعات
98.0%	95.1%	84.2%	3618	8 - 12 ساعة
97.5%	94.3%	84.6%	20685	الإجمالي

لا يوجد فارق فعلي في الدقة إجمالاً بناءً على طول المدة التي مرت عند تسجيل قراءات مراقبة الجلوكوز المستمرة بعد آخر معايرة للجلوكوز بالدم.

الدراسات PRECISE II/PRECISION

تم إجراء المزيد من التقييم لأداء نظام Eversense CGM في دراستين سريريتين متعددتي المواقع وغير عشوائيتين في الولايات المتحدة. جرت متابعة مائة وخمسة وعشرين مشاركًا (125) لمدة 90 يومًا بعد إدخال المستشعر. تم استخدام برنامج جديد للنظم الحسابية للجلوكوز في هاتين الدراستين. أوضحت كلتا الدراستين توافقًا ثابتًا بنسبة 87% و85% في قراءات مراقبة الجلوكوز المستمرة ضمن نسبة 15%* من قيم YSI المرجعية. أوضح التحليل البعدي لدراسة PRECISE II باستخدام برنامج النظم الحسابية 602 متوسط فارق نسبي مطلق يبلغ 8.5%.

دراسات الجدوى

تم إجراء دراستي جدوى في كندا وأوروبا لتقييم عمر المستشعر. في هاتين الدراستين، تم إدخال مستشعر Eversense في 70 خاضعًا للدراسة لمدة 6 أشهر. مستشعر Eversense الذي تم استخدامه في هاتين الدراستين هو نفسه الذي استخدم في دراستي PRECISE II وPRECISION. في هاتين الدراستين، ظهر أن طول عمر المستشعر يبلغ 97% في اليوم 90 و78-80% في اليوم 180.

*بالنسبة للقيم الأقل من 80 mg/dL، تم استخدام القيمة المطلقة التي تبلغ 15 mg/dL.

ارتداء جهاز الإرسال الذكي

تم حساب مدة ارتداء جهاز الإرسال الذكي، بشكل عام، ارتدى الخاضعون لدراسة PRECISE أجهزة الإرسال الذكي الخاصة بهم لمدة 22.4 ساعة يوميًا بالمعدل وحققوا وسيطًا بلغ 23.5 ساعة. بلغ وسيط مدة الارتداء في دراستي PRECISE II و PRECISION 23.4 ساعة.

السلامة

أثناء دراسة PRECISE على مدار 180 يومًا، كان المستشعر متعدد العمر ضمن نظام مراقبة الجلوكونز المستمرة جيد التحمل للغاية لدى 81 شخصًا مدرجين في الدراسة. وعلى مدار ارتداء المستشعر في الدراسة لأكثر من 21000 يوم، لم تكن هناك أحداث مناوئة خطيرة تم الإبلاغ عنها وترتبط باستخدام النظام أو عملية الإدخال/الإخراج. تم الإبلاغ عن حادث مناوئ خطير واحد في دراسة PRECISE II يرتبط بعملية الإدخال/الإخراج. لم يتم الإبلاغ عن أحداث مناوئة خطيرة في دراسة PRECISION ترتبط باستخدام النظام أو عملية الإدخال/الإخراج. تمت ملاحظة تهيج واحمرار معتدل عند موضع الإدخال بمعدل تكرار منخفض في دراسة PRECISE، وأثناء الاستخدام في العالم الواقعي بواسطة 3066 شخصًا.

20. المواصفات الفنية

المستشعر

الميزة	الوصف
الأبعاد	الطول: 18.3 مم القطر: 3.5 مم
المواد	ميثيل ميثاكريليت متعدد (PMMA) متجانس البوليمر ، هلام مائي مكون في الأساس من هيدروكسي إيثيل ميثاكريليت (HEMA)، بلاتين، سيليكون، أسيتات ديكساميثازون، إيبوكسي 2-301
نطاق الجلوكوز	40 - 400 mg/dL
عمر المستشعر	حتى 180 يومًا
المعايرة	جهاز قياس الجلوكوز بالدم للمراقبة الذاتية المتاح تجاريًا
نطاق المعايرة	40 - 400 mg/dL
التعقيم	التعقيم باستخدام أكسيد إيثيلين

جهاز الإرسال الذكي

الميزة	الوصف
الأبعاد	الطول: 37.6 مم العرض: 48.0 مم السُمك: 8.8 مم
المواد	الهيكِل: بولي كربونات
الوزن	11.3 جم
مصدر الطاقة	بطاريات ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن (غير قابلة للاستبدال)
ظروف التشغيل	5 - 40 درجة مئوية (41 - 104 درجة فهرنهايت)
عمر التشغيل	12 شهرًا
ظروف التخزين	0 - 35 درجة مئوية (32 - 95 درجة فهرنهايت)
الحماية من الرطوبة	IP67: تم الغمر حتى عمق متر في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة
الحماية من الصدمة الكهربائية	جزء مستخدم من النوع BF
وقت الشحن باستخدام مهايئ التيار المتردد	15 دقيقة حتى الشحن الكامل
مسافة الاتصال	بين التطبيق وجهاز الإرسال الذكي حتى 7.6 أمتار (25 قدمًا) لن يعمل الاتصال اللاسلكي مع التطبيق جيدًا عند الاتصال عبر الماء. سينخفض النطاق إذا كنت في مغطس استحمام أو فراش مائي أو حمام سباحة، إلخ.
ضغط المقصورة	700 هكتو باسكال إلى 1060 هكتو باسكال
نطاق الرطوبة النسبية (من دون تكاثف)	15% إلى 90%
الارتفاع	10,000 قدم (3,048 مترًا)

الإمداد بالطاقة والشاحن

الميزة	الوصف
الفئة	الثانية
تيار الدخل	دخل تيار متردد، 100-240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز، 0.3-0.15 أمبير
خرج التيار المستمر	5 فولت تيار مستمر، 1 أمبير (5.0 وات)
الحماية من الرطوبة (حامل الشحن)	IP22

*كابل USB للشحن والتنزيل

الميزة	الوصف
دخل/خرج	5 فولت تيار مستمر، 1 أمبير
النوع	USB-A إلى USB micro-B
الطول	36 بوصة (91 سم)

*في حالة إساءة استخدام كابل USB، قد يشكل خطر الاختناق. يمكن توصيل كابل USB بمصدر الطاقة/الشاحن وشحنه باستخدام منفذ التيار المتردد. لعزل النظام، افصل الشاحن/مصدر الإمداد بالطاقة من المنفذ. إذا كنت تشحن جهاز الإرسال الذكي باستخدام منفذ USB في الكمبيوتر الشخصي لديك، فتأكد من أن الكمبيوتر الشخصي يتوافق مع معيار السلامة IEC 60950-1 (أو ما يعادله).

المعايير الكهربائية والخاصة بالسلامة

الإرشاد وبيان الشركة المنتجة - الحصانة الكهرومغناطيسية

جهاز الإرسال معدّ للاستخدام في الوسط الكهرومغناطيسي المحدد في الجدول التالي. ينبغي على العميل أو مستخدم جهاز الإرسال أن يتأكد من استخدامه في هذه البيئة.

مواصفات الحصانة الكهرومغناطيسية لجهاز الإرسال

اختبار الحصانة	اختبار الحصانة	مستوى امتثال جهاز الإرسال	توجيهات الوسط الكهرومغناطيسي
تفريغ الكهرباء الاستاتيكية 2-4-61000 (ESD) IEC	± 8 كيلو فولت بالتلامس ± 15 كيلو فولت في الهواء	± 8 كيلو فولت بالتلامس ± 15 كيلو فولت في الهواء	ينبغي أن تكون الأرضيات من الخشب أو الاسمنت أو بلاط السيراميك. إذا كانت الأرضيات مغطاة بمادة صناعية، ينبغي ألا تقل الرطوبة النسبية عن 30%.
تردد الطاقة (110 فولت تيار متردد/60 هرتز، 230 فولت تيار متردد/50 هرتز) المجال المغناطيسي IEC 8-4-61000	A/m 30	A/m 30	ينبغي أن تكون المجالات المغناطيسية لتردد الطاقة بالمستويات المعروفة عن المواقع المعتادة في البيئة التجارية أو بيئة المستشفى المعتادة.

المعايير الكهربائية والخاصة بالسلامة (تابع)

يهدف نظام Eversense XL CGM إلى استخدامه في البيئة الكهرومغناطيسية المذكورة بالتفصيل في الجدول أدناه. ينبغي أن يتأكد مستخدمو النظام من استخدامه وفق هذه المواصفات.

مواصفات الحصانة الكهرومغناطيسية للنظام

اختبار الحصانة	مستوى الاختبار IEC 60601	مستوى امتثال جهاز الإرسال	توجيهات الوسط الكهرومغناطيسي
التردد اللاسلكي الموجه IEC 6-4-61000 (الهاتف الذكي فقط (الجهاز المتلقي))	≤ 3 جذر متوسط المربع للجهد الكهربائي (150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا هرتز)	3 جذر متوسط المربع للجهد الكهربائي	قد يحدث التعارض بجوار المعدات التي عليها الرمز التالي: ((٠))
التردد اللاسلكي الصادر IEC 3-4-61000	≤ 10 فولت/متر عند 80 ميغا هرتز إلى 2700 ميغا هرتز (تعديل AM)	3 جذر متوسط المربع للجهد الكهربائي	

ملاحظة 1: عند 80 ميغا هرتز و 800 ميغا هرتز، يسري مجال التردد الأعلى.

ملاحظة 2: قد لا تسري هذه الإرشادات على كل المواقف. يتأثر الانتشار الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس من الهياكل والأشياء والناس. أ. نقاط قوة الحقل من أجهزة الإرسال الثابتة، مثل المحطات الأرضية للهوائيات اللاسلكية (الخلوية/من دون أسلاك) والأجهزة اللاسلكية المتنقلة الأرضية، ولاسلكي الهواء، والبيث اللاسلكي على موجات AM و FM، وبيث التلفاز لا يمكن التنبؤ بها نظرياً بدقة لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية الناتجة عن أجهزة الإرسال الثابتة بتردد لاسلكي، ينبغي النظر في إجراء مسح كهرومغناطيسي للموقع. إذا كانت قوة الحقل التي تم قياسها في الموقع حيث يتم استخدام نظام Eversense XL CGM تتجاوز مستوى امتثال التردد اللاسلكي الساري أعلاه، ينبغي مراقبة نظام Eversense XL CGM للتحقق من التشغيل العادي. إذا تمت ملاحظة أداء غير طبيعي، فقد تكون هناك إجراءات إضافية ضرورية مثل تغيير اتجاه نظام Eversense XL CGM أو تغيير موضعه. ب. على مدى نطاق التردد 150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا هرتز، ينبغي أن تقل قوة الحقل عن 10 فولت/متر.

المعايير الكهربائية والخاصة بالسلامة (تابع)

الإرشاد وبيان الشركة المنتجة - الانبعاثات الكهرومغناطيسية

تم تصميم نظام Eversense XL CGM للأجهزة المحمولة للاستخدام في الوسط الكهرومغناطيسي المحدد في الجدول التالي. ينبغي على العميل أو مستخدم النظام أن يتأكد من استخدامه في هذه البيئة.

اختبار الانبعاثات	الامتثال	توجيهات الوسط الكهرومغناطيسي
انبعاثات التردد اللاسلكي 11 CISPR	المجموعة 1	يستخدم نظام Eversense XL CGM طاقة التردد اللاسلكي فقط في وظيفته الداخلية. ولهذا، تُعتبر انبعاثات التردد اللاسلكي منه منخفضة جداً وليس من المرجح أن تسبب أي تعارض مع المعدات الإلكترونية القريبة.
انبعاثات التردد اللاسلكي 11 CISPR	الفئة ب	يتناسب نظام Eversense XL CGM مع الاستخدام في كل المنشآت، بما في ذلك الأماكن المنزلية والمنشآت المتصلة بشكل مباشر بالشبكة العامة للإمداد بالطاقة منخفضة الجهد الكهربائي التي توفر الإمداد للمباني المستخدمة في الأغراض المنزلية.

مسافات الفصل الموصى بها بين معدات الاتصالات بالتردد اللاسلكي المحمولة/المتنقلة الأخرى والهاتف الذكي (الجهاز المتلقي)

اتبع تعليمات الشركة منتجة الهاتف الذكي (أو الجهاز المتلقي الآخر) لمسافات الفصل. يستطيع العميل أو مستخدم الهاتف الذكي (أو الجهاز المتلقي الآخر) أن يساعد في منع التداخل الكهرومغناطيسي عن طريق الحفاظ على حد أدنى من المسافة بين معدات الاتصالات بالتردد اللاسلكي المحمولة/المتنقلة الأخرى (أجهزة الإرسال) والهاتف الذكي على الأقل 30 سم (حوالي 12 بوصة). تشمل معدات التردد اللاسلكي المحمولة/المتنقلة: أجهزة مراقبة الأطفال وساعات Bluetooth اللاسلكية وأجهزة التوجيه اللاسلكي وأفران الميكرويف وأجهزة الكمبيوتر المحمول ذات مهايئات الواي فاي الداخلية والهواتف الخلوية بشبكة GSM وأجهزة المسح الضوئي بالتعرف عن طريق التردد اللاسلكي وجهاز كشف المعادن الأمني المحمول باليد الذي يستخدمه موظفو الأمن عادة.

الرموز على تطبيق Eversense XL للأجهزة المحمولة

الرمز	الشرح
	تنبيه الجلوكوز يظهر عندما يكون الجلوكوز أعلى من نطاق التنبيه بارتفاع الجلوكوز وأقل من نطاق التنبيه بانخفاض الجلوكوز. تظهر الأيقونة على شاشة ALERT HISTORY .
	تنبيه انخفاض المعدل يظهر عندما تهبط قيمة الجلوكوز إلى أقل من معدل محدد.
	تنبيه ارتفاع المعدل يظهر عندما ترتفع قيمة الجلوكوز أبعد من معدل محدد.
	تنبيه البطارية الفارغة يظهر عندما تكون بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة.
	تنبيه انخفاض شحن البطارية يظهر عندما يكون شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي أقل من 10%.
	تنبيه جهاز الإرسال الذكي/المستشعر تظهر الأيقونة على شاشة ALERT HISTORY فقط.
	إشعارات جهاز الإرسال الذكي/المستشعر تظهر عندما تكون هناك إشعارات مرتبطة بجهاز الإرسال الذكي أو المستشعر.

الرموز على تطبيق Eversense XL للأجهزة المحمولة (تابع)

الرمز	الشرح
	تنبيه المعايير يظهر عندما تكون هناك تنبيهات مرتبطة بالمعايير.
	إشعار المعايير يظهر عندما تكون هناك إشعارات مرتبطة بالمعايير.
	فشل المعايير يظهر عندما يرفض جهاز الإرسال الذكي قيمة المعايير التي أدخلها المستخدم.
	فشل الاتصال يظهر عند فصل جهاز الإرسال الذكي من الهاتف الذكي أو عندما لا يكون المستشعر مرتبطاً بجهاز الإرسال الذكي.
	تنبيهات متعددة (أكثر من تنبيه أو حدث) يظهر عندما يكون هناك تنبيهان أو حدثان أو أكثر في فترة زمنية قصيرة.
	الملف الشخصي المؤقت يظهر عندما يكون الملف الشخصي المؤقت نشطاً.







الرموز الموجودة على العبوة والأجهزة

الرمز	الشرح
	علامة تثبت أن الجهاز يفي بتوجيهات المجلس الأوروبي EEC/385/90
	رقم القطعة
	الرقم التسلسلي
	جزء مستخدم من النوع BF
	إشعاع كهرومغناطيسي غير مؤين
	غير مصنوع من لاتكس المطاط الطبيعي
	يتم تعيين معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC ID) لكل الأجهزة الخاضعة للاعتماد
	غير معقم

الرمز	الشرح
	راجع المستندات المصاحبة
	تنبيه، راجع المستندات المصاحبة
	الاستخدام بواسطة
	الشركة المنتجة
	المندوب المعتمد في الاتحاد الأوروبي
	تاريخ التصنيع
	حدود درجة حرارة التخزين
	رقم الدفعة
	الناقل التسلسلي العام (USB)

الرموز الموجودة على العبوة والأجهزة (تابع)

الرمز	الشرح
	يتم تعقيمه باستخدام أكسيد الإيثيلين
	حاجز تعقيم فردي: معقم باستخدام أكسيد الإيثيلين
	اتبع تعليمات الاستخدام
	جهاز طبي

الرمز	الشرح
	يُمنع استخدام إجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي بالنسبة لجهاز الإرسال الذكي
	لا توجد مخاطر معروفة فيما يتعلق بترك المستشعر في الداخل عند استخدام الرنين المغناطيسي بمجال ثابت قدره 1.5 تسلا أو 3.0 تسلا، شريطة اتباع تعليمات المسح عن كثب. يرجى الرجوع إلى قسم معلومات السلامة الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للاطلاع على المعلومات كاملة.
	توجيه مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية من الاتحاد الأوروبي EU/19/2012
	للاستخدام مرة واحدة فقط
	لا تقم بإعادة التعقيم
	لا تستخدمه إذا كانت العبوة تالفة

الضمان المحدود لجهاز إرسال Eversense XL الذكي

1. التغطية ومدة الضمان المحدود.

تضمن شركة Senseonics, Incorporated (يشار إليها "Senseonics") للمريض الأصلي والمستخدم النهائي ("أنت") لجهاز إرسال Eversense XL الذكي ("جهاز الإرسال الذكي") أن جهاز الإرسال الذكي سيكون خاليًا من العيوب في المادة والصناعة في ظل الاستخدام العادي لمدة عام (365 يومًا) بدءًا من تاريخ تلقيك لأول مرة لجهاز الإرسال الذكي من مزود الرعاية الصحية الخاص بك ("فترة الضمان المحدود"). يعطيك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، وقد تحصل أيضًا على حقوق أخرى تختلف من سلطة قضائية لأخرى. يتم تقديم هذا الضمان المحدود بشرط أن تقدم إشعارًا كتابيًا إلى شركة Senseonics بأي عيوب في المادة و/أو الصناعة فورًا عند اكتشافها، وبشرط أن تقرر شركة Senseonics أن دعوًا تعود إلى عيوب في المادة الأصلية و/أو الصناعة. إذا قدمت لك شركة Senseonics جهاز إرسال بديلاً وفق بنود هذا الضمان المحدود، فإن أي ضمان متبقٍ لجهاز الإرسال الذكي الأصلي سينتقل إلى جهاز الإرسال الذكي البديل وتنتهي فترة ضمان جهاز الإرسال الذكي البديل بعد مرور سنة على تاريخ حصولك على جهاز الإرسال الذكي لأول مرة من مزود الرعاية الصحية الخاص بك، وسيكون هذا الضمان لا غيًا فيما يخص جهاز الإرسال الذكي الأصلي.

2. الاستثناءات من الضمان المحدود.

لا يسري الضمان المحدود إلا على جهاز الإرسال الذكي من تصنيع شركة Senseonics، وهو مشروط باستخدامك الملائم للمنتج. لا يغطي الضمان المحدود (أ) الضرر التجميلي أو الخدش أو الضرر الآخر للأسطح والأجزاء المكشوفة بسبب الاستخدام العادي و(ب) الضرر الناتج عن حادث، أو إهمال، أو تقصير آخر، أو إساءة استعمال، أو ضغط بدني أو كهربائي أو ميكانيكي كهربائي غير معتاد، أو تعديل لأي جزء في المنتج و(ج) المعدات التي تم تعديلها لإزالة رقم المعرف أو تعديله أو جعله غير مقروء و(د) الأعطال الناتجة عن الاستخدام مع المنتجات أو الملحقات أو الأجهزة الطرفية غير المجهزة أو المعتمدة كتابيًا من شركة Senseonics و(هـ) الأجزاء المستهلكة (البطاريات) و(و) المعدات التي تم تفكيكها و(ز) التلف الناتج عن التشغيل أو الاختبار أو الصيانة أو التركيب أو التعديل غير الملائمين.

جهاز الإرسال الذكي مقاوم للماء حسب المواصفات المذكورة في دليل المستخدم. لا يغطي هذا الضمان المحدود التلف الناتج عن الماء إذا تعرض غطاء جهاز الإرسال الذكي للتشقيق أو التلف بطريقة أخرى. لا يسري هذا الضمان المحدود على الخدمات أو المعدات أو البرمجيات المصاحبة التي قد تُستخدم مع جهاز الإرسال الذكي.

3. التزامات شركة Senseonics بموجب الضمان المحدود.

تعويضك الوحيد والحصري والالتزام الوحيد والحصري من شركة Senseonics بموجب هذا الضمان المحدود هو الإصلاح أو الاستبدال، وفقاً لما تراه من دون أن تدفع مقابل، لأي جهاز إرسال ذكي معيب بشرط أن ينشأ العيب وتتلقى شركة Senseonics دعوى شرعية خلال فترة الضمان المحدود. يجب عليك إعادة جهاز الإرسال الذكي المعيب إلى إدارة معتمدة لخدمة العملاء في Senseonics في حاوية شحن ملائمة توفر حماية كافية لجهاز الإرسال الذكي من حدوث تلف آخر ومع اسمك وعنوانك واسم مزود الرعاية الصحية الذي حصلت منه على جهاز الإرسال الذكي وعنوانه وتاريخ جهاز الإرسال الذكي ورقم تعريفه. للتعرف على مكان إرسال جهاز الإرسال الذكي، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني <https://global.eversensedidiabetes.com/contact-us>. عند تلقي جهاز الإرسال الذكي، إذا قررت شركة Senseonics أنه ضمن تغطية الضمان المحدود وأن التغطية ليست مستبعدة، فسوف تستبدله شركة Senseonics فوراً. إذا قررت شركة Senseonics أن جهاز الإرسال الذكي ليس ضمن تغطية الضمان المحدود، يجوز أن تشتري بديلاً أو أن تدفع مسبقاً كل رسوم الشحن إذا أردت إعادة جهاز الإرسال الذكي الأصلي.

يحصل جهاز الإرسال الذكي الذي تم إصلاحه أو استبداله على الضمان المتبقي لجهاز الإرسال الذكي الأصلي أو [30] يوماً من تاريخ الاستبدال أو الإصلاح، الأطول من بينهما.

4. حدود التزامات شركة Senseonics بموجب الضمان المحدود.

الضمان المحدود من شركة SENSEONICS المذكور أعلاه حصري ويحل مكان كل الضمانات الأخرى الصريحة أو الضمنية إما في الواقع أو بموجب القانون أو التشريع أو غير ذلك وتستبعد شركة SENSEONICS صراحة وترفض كل هذه الضمانات الأخرى، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - أي ضمان أو شرط ضمني بالقابلية للتسويق التجاري أو الملاءمة لغرض معين أو عدم الانتهاك أو الجودة المرضية أو عدم التداخل أو دقة المحتوى المعلوماتي أو ما ينشأ عن مسار التعامل أو القانون أو الاستخدام أو الممارسة التجارية. باستثناء الحد المحظور بموجب القانون الساري، لن تتحمل شركة SENSEONICS المسؤولية عن أي تلفيات خاصة أو عارضة أو تابعة أو غير مباشرة أيًا كان سببها ووفق أي نظرية للمسؤولية تنشأ بأي طريقة عن البيع أو الاستخدام أو إساءة الاستخدام أو عدم القدرة على الاستخدام لأجهزة الإرسال الذكية أو أي نظام EVERSENSE XL من شركة SENSEONICS. يسري هذا القيد حتى لو تم إبلاغ شركة SENSEONICS أو كليهما بهذه الأضرار وبغض النظر عن أي فشل في الغرض الأساسي من هذا التعويض المحدود. لن يمتد هذا الضمان المحدود لأي أحد بخلافك باعتبارك المستخدم النهائي الأصلي لهذا المنتج وهو ينص على تعويضك الحصري. إذا كان أي جزء من هذا الضمان المحدود غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بسبب أي قانون، وفي حدود عدم قدرة شركة SENSEONICS بموجب القانون الساري على إخلاء المسؤولية عن أي ضمان ضمني أو الحد من مسؤولياتها، فإن نطاق هذا الضمان ومدته وحدود المسؤولية على شركة SENSEONICS سيكونون في الحد الأدنى المسموح به بموجب هذا القانون الساري.

مكون النظام	رقم القطعة
طقم جهاز إرسال Eversense XL الذكي	FG-3400-01-001
كابل الشحن	FG-6100-00-301
مهايئ الشحن	FG-6201-93-301
حامل الشحن	FG-6501-00-301
رقعات Eversense اللاصقة، بيضاء، عبوة بها 30 قطعة	FG-6400-00-301
رقعات Eversense اللاصقة، شفافة، عبوة بها 30 قطعة	FG-6400-00-300
دليل Eversense XL المرجعي السريع	LBL-1403-01-001
دليل مستخدم Eversense XL CGM	LBL-1402-01-001
تطبيق Eversense Data Management Software	FG-5200-01-300
تطبيق Eversense XL للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS	FG-5101-01-300
تطبيق Eversense XL للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android	FG-5301-01-300

إشعارات قانونية

إشعار قانوني خاص بشركة Apple

تعني عبارات "مصنوع لجهاز iPod touch" و"مصنوع لجهاز iPhone" و"مصنوع لجهاز iPad" أن أحد الملحقات الإلكترونية قد تم تصميمه ليتصل تحديداً بجهاز iPod touch أو iPhone أو iPad على التوالي وتم اعتماده من المطور لتحقيق معايير أداء شركة Apple. لا تتحمل شركة Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى الانتباه إلى أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPod touch أو iPhone أو iPad يمكنه أن يؤثر على الأداء اللاسلكي.

Apple و iPhone و iPod و iPod touch علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إشعار قانوني خاص بشركة Google

اسم "Android" وشعار Android و Google Play و Google Inc علامات تجارية مملوكة لشركة Google Inc.

معلومات حول Bluetooth®

Bluetooth® نوع من الاتصال اللاسلكي (التردد اللاسلكي). تستخدم الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية تقنية Bluetooth® كما هو الحال في الكثير من الأجهزة الأخرى. يستخدم جهاز الإرسال الذكي الخاص بـ Bluetooth® Smart للاقتتران بالجهاز المحمول ولإرسال النتائج إلى التطبيق.

علامة Bluetooth® التجارية

علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة Senseonics, Inc. هو بموجب ترخيص.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق جهاز الإرسال الذكي مع الجزء 15 في قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- (1) لن يسبب هذا الجهاز أي تداخل ضار.
- (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

يمكن أن تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة من شركة Senseonics, Inc. إلى إلغاء التفويض الممنوح للمستخدم لتشغيل الجهاز.

تساعد هذه الإرشادات على ضمان عدم تأثير جهاز الإرسال الذكي الخاص بك على تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى القريبة. كما أن الأجهزة الإلكترونية الأخرى ينبغي ألا تؤثر على استخدام جهاز الإرسال الذكي الخاص بك.

باستثناء جهازك المحمول، قد تمنع أو تؤخر الأجهزة اللاسلكية الإلكترونية الأخرى قيد الاستخدام في مكان قريب، مثل الهاتف الخليوي أو الميكرويف أو الشبكة اللاسلكية، نقل البيانات من جهاز الإرسال الذكي الخاص بك إلى التطبيق أو تخرجه. وقد يسمح الانتقال بعيداً عن هذه الأجهزة الإلكترونية أو إيقاف تشغيلها بالاتصال.

تم اختبار جهاز الإرسال الذكي وتبين أنه ملائم للاستخدام في المنزل. في معظم الحالات، ينبغي ألا يتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المنزلية الأخرى إذا تم استخدامه حسب التعليمات. إلا أن جهاز الإرسال الذكي هذا يُصدر طاقة تردد لاسلكي. إذا لم يتم استخدام جهاز الإرسال الذكي الخاص بك بالشكل الصحيح، فقد يتداخل مع تلفازك أو مذياعك أو أجهزةك الإلكترونية الأخرى التي تتلقى إشارات التردد اللاسلكي أو تبثها.

إذا تعرضت لمشاكل تداخل في التشغيل من جهاز الإرسال الذكي، فحاول أن تنتقل بعيداً عن مصدر التداخل. يمكنك أيضاً نقل الجهاز الإلكتروني أو الهوائي الخاص به إلى موقع آخر لحل المشكلة.

إذا استمر التعرض لتداخل، اتصل بخدمة العملاء في الشركة منتجة الجهاز الإلكتروني المسبب للتداخل.

38,36	رقعة لاصقة	155,154	الرموز والتنبيهات والإشعارات	56	أسهم الاتجاهات
58,53,51,30	شاشة MY GLUCOSE	39,34,28	الزر في جهاز الإرسال الذكي	58,46,42	إجراء المعايرة
22	شحن البطارية	125	السفر	124,123,31	إدخال المستشعر وإخراجه
40	صيانة جهاز الإرسال الذكي	58	القلمة	130,129	إعادة تشغيل Bluetooth
22	كابل USB	45,42	المرحلة اليومية في المعايرة	130,89	إعادة ضبط جهاز الإرسال الذكي
161,51,24,21,11	لاسلكي	122,8	المستشعر، حول		إقران جهاز الإرسال الذكي
40	مؤشر طاقة البطارية	62	المستويات المستهدفة	129,28,25	مع جهاز محمول
41,39,34,23	مؤشر مصباح LED	44,42	المعايرة، مرحلة التهيئة	98,58	الأحداث
162	معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية	75	الملف الشخصي الموقت		الأسئلة المتكررة حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها
15,8	مكونات النظام	131,129,28	الوضع القابل للاكتشاف	126	الإشعارات
22	منفذ USB	70,29	تذكيرات المعايرة	97,96,79	الإعدادات، التطبيق
23	مهايئ الطاقة	36	تركيب جهاز الإرسال الذكي	71,60,58,25	الاتصال بالتردد اللاسلكي (RF)
58,37	موجه الموضع، قوة الإشارة	78	تسجيل الخروج من التطبيق	161	التطبيق، الاستخدام
30	وحدة القياس	39	تشغيل/إيقاف جهاز الإرسال الذكي	51	التطبيق، معلومات المنتج
74	وضع عدم الإزعاج Do Not Disturb	25	تشغيل التطبيق	112,111	التطبيق، نظرة سريعة
161,58	Bluetooth	24	تنزيل التطبيق	114	التنبيهات
130,129	Bluetooth، إعادة تشغيل	72	جدول أوقات الوجبات	81,80,79,73,68,66,64,58	91,90,89,88,87,86,85,84,83,82
108	Eversense DMS	130,89	جهاز الإرسال الذكي، إعادة ضبط	95,94,93,92	الجهاز المحمول
116,110	My Circle	35,34	جهاز الإرسال الذكي، استخدام	51,24	الجهاز المحمول، Apple Watch
104,58	Reports	15	حامل الشحن	113	الرسم البياني للاتجاه
108	Share my data	58,9	حول التطبيق	57	الرموز والتغليف والجهاز
		15,8	حول جهاز الإرسال الذكي	157,156	
		31	ربط جهاز الإرسال الذكي بالمستشعر		

Distributed by:

DYN Diagnostics Ltd.

7 Ha'eshel St. P.O. Box 3063

Caesarea Industrial Park 3079504, Israel

Phone: 04-6175390

Email: patient.care@dyn.co.il

שם הרישום באמ"ר:

מערכת לניטור סוכר רציף Eversense XL

Eversense XL Continuous Glucose Monitoring System

מס' רישום: 2660676

שם היצרן וכתובתו: סנסאוניקס, אינק. סנקה מדווס

פארקווי 20451, ג'רמנטאון, אמ.ד.י. 20876-7005, ארה"ב

פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיץ בישראל:

דין דיאגנוסטיקה בע"מ

רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504

04-6175390

patient.care@dyn.co.il



Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP, The Hague

The Netherlands



Authorised 2016



(241) LBL-1402-44-001_REV_J

Senseonics, Inc. تم التصنيع بواسطة شركة

20451 Seneca Meadows Parkway

Germantown, MD 20876-7005 USA

844.SENSE4U | 301.515.7260

(844.736.7348)

global.eversensedidiabetes.com



Dimensions	
Trim: 6.75" w x 5.8" h	Bleed: 0.125"
Folded <i>(Include folded dimensions if applicable):</i>	

Colors: 4/color
Spot <i>(Name PMS colors if applicable):</i> N/A

Paper Weight:
Cover: 65# Gloss Cover
Text: 60# Gloss Text