

eversense<sup>®</sup> XL

## Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkowania systemu ciągłego  
monitorowania glikemii Eversense XL CGM.

Czujnik

Inteligentny  
nadajnik

Aplikacja mobilna





### **Znak handlowy Eversense XL**

Eversense XL, system ciągłego monitorowania glikemii Eversense XL, Eversense XL CGM, czujnik Eversense XL, inteligentny nadajnik Eversense XL, aplikacja Eversense XL oraz logo Eversense XL są znakami towarowymi firmy Senseonics, Incorporated. Pozostałe marki i ich produkty są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

# Spis treści

---

Słowniczek.....	5	Krok 2. Skonfigurowanie aplikacji – Założenie konta, Parowanie i Ustawienia.....	26
I. Wprowadzenie.....	7	4. Wszczepienie i łączenie czujnika.....	32
Pomoc techniczna.....	7	5. Użytkowanie inteligentnego nadajnika.....	35
Elementy systemu Eversense XL CGM.....	8	Codzienne użytkowanie.....	36
Wymagania systemowe.....	12	Mocowanie inteligentnego nadajnika nad wszczepionym czujnikiem.....	37
Licencja dla użytkownika końcowego i polityka prywatności.....	12	Włączanie i wyłączanie inteligentnego nadajnika.....	40
Urządzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu.....	12	Obsługa i konserwacja inteligentnego nadajnika.....	41
Uszkodzony ekran lub przycisk.....	12	Wskaźnik poziomu naładowania baterii.....	41
Wskazania do stosowania.....	13	Kontrolki LED stanu.....	42
Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI.....	13	6. Kalibrowanie systemu.....	43
Przeciwwskazania.....	14	Fazy kalibracji.....	45
Zawartość opakowania.....	15	Metoda kalibracji.....	47
Korzystanie z instrukcji użytkownika.....	15	7. Użytkowanie aplikacji.....	52
2. Korzyści i zagrożenia.....	16	Sprawdzanie ustawień urządzenia przenośnego.....	52
Zagrożenia i działania niepożądane.....	17	Zarządzanie kontem w aplikacji Eversense.....	53
Ostrzeżenia.....	18		
Przestrogi.....	20		
3. Rozpoczynanie pracy.....	22		
Ładowanie baterii inteligentnego nadajnika.....	23		
Krok 1. Pobranie i zainstalowanie aplikacji.....	25		



Ekran „Moja Glukoza”	54	Stan zdrowia	104
Strzałki trendu	57	Ćwiczenie	105
Wykres trendu	58	<b>II. Raporty.....</b>	<b>106</b>
Opcje menu	59	Tygodniowe zestawienie modalne	107
Zdjęcie profilowe	61	Wykres kołowy stężenia glukozy	108
<b>8. Ustawienia systemu.....</b>	<b>62</b>	Raport statystyk poziomu glukozy	108
Ustawianie poziomów docelowych poziomu glukozy	64	<b>12. Funkcja Udostępnij moje dane.....</b>	<b>109</b>
Ustawianie poziomów alertów poziomu glukozy	66	Oprogramowanie do zarządzania danymi Eversense DMS	109
Ustawianie alertów przewidywania	68	Synchronizacja	110
Ustawianie alertów o szybkości zmian	70	Mój krąg	111
Ustawianie godziny dziennej kalibracji	72	<b>13. Ogólne informacje o aplikacji .....</b>	<b>112</b>
Ustawianie informacji o systemie	73	<b>14. Przeglądanie danych z systemu Eversense XL na urządzeniu Apple Watch.....</b>	<b>114</b>
Ustawienia harmonogramu posiłków	74	Szybki podgląd	115
Ustawianie dźwięków	75	<b>15. Mój krąg.....</b>	<b>117</b>
Ustawianie profilu tymczasowego	77	Zdalne monitorowanie przy użyciu systemu Eversense XL CGM i aplikacji Eversense NOW	117
Wylogowanie	80		
<b>9. Opisy alertów.....</b>	<b>81</b>		
Alerty i powiadomienia	81		
Historia alertów	82		
Opisy alertów i wymagane działania	83		
<b>10. Dziennik zdarzeń.....</b>	<b>100</b>		
Poziom glukozy	101		
Posiłek	102		
Insulina	103		

<b>16. Informacje o czujniku.....</b>	<b>123</b>	Badania PRECISE II/PRECISION	147
Etapy wszczepiania	124	Badania wykonalności	147
Etapy wyjmowania	125	Noszenie inteligentnego nadajnika	148
<b>17. Podróże.....</b>	<b>126</b>	Bezpieczeństwo	148
<b>18. Rozwiązywanie problemów.....</b>	<b>127</b>	<b>20. Dane techniczne.....</b>	<b>149</b>
Inteligentny nadajnik	127	Czujnik	149
Bateria inteligentnego nadajnika		Inteligentny nadajnik	150
i jej ładowanie	128	Zasilacz i ładowarka	151
Łączenie z inteligentnym nadajnikiem	129	Przewód USB* do ładowania	
Kalibracja	133	i pobierania	151
Alerty i powiadomienia	135	Normy techniczne	152
Odczyty poziomu glukozy	137	Symbole aplikacji mobilnej	
Strzałki trendu	138	Eversense XL	155
Aplikacja	138	Symbole na opakowaniu i urządzeniu	157
Czujnik	139	Warunki ograniczonej gwarancji	
Zdarzenia	141	inteligentnego nadajnika	159
Synchronizacja	142	<b>Informacje prawne.....</b>	<b>162</b>
Skróty	142	Informacje prawne firmy Apple	162
<b>19. Działanie systemu.....</b>	<b>143</b>	Informacje prawne firmy Google	162
Parametry pracy systemu w trakcie		Informacje o Bluetooth®	162
badania klinicznego oraz Informacje		Znak handlowy Bluetooth®	162
ogólne	143	Informacje FCC	163
Badanie PRECISE	143	<b>Indeks.....</b>	<b>164</b>
Analiza siatki błędów Clarke'a	144		
Prawidłowość kalibracji	146		

# Słowniczek

---

**Alert** Komunikat który ostrzega o wystąpieniu sytuacji wymagającej uwagi i reakcji użytkownika w celu podjęcia odpowiedniego działania.

**Aplikacja Eversense** Oprogramowanie instalowane na urządzeniu przenośnym, które przedstawia dane poziomu glukozy z uzyskane z inteligentnego nadajnika, jednego z elementów systemu CGM.

**Bluetooth®** Nazwa technologii wykorzystującej fale na częstotliwości radiowej (RF) do bezprzewodowej komunikacji między urządzeniami mobilnymi i innymi urządzeniami.

**CGM** System ciągłego monitorowania glikemii z płynu tkankowego odczytywany co kilka minut.

**Czujnik** Element systemu wprowadzany podskórnie w celu zapewnienia ciągłego pomiaru poziomu glukozy w płynie tkankowym.

**EULA** licencja dla użytkownika końcowego.

**Eversense NOW** Aplikacja mobilna do zdalnego monitorowania umożliwiająca udostępnianie danych poziomu glukozy innym osobom.

**FAQ** Najczęściej zadawane pytania.

**Faza nagrzewania** Okres adaptacyjny czujnika między umieszczeniem pod skórą i skalibrowaniem.

**Glukometr** Urządzenie służące do pomiaru poziomu glukozy przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszka palca.

**Hiperglikemia** Epizod z wysokim poziomem glukozy.

**Hipoglikemia** Epizod z niskim poziomem glukozy.

**Inteligentny nadajnik** Urządzenie wielorazowego użytku noszone na zewnątrz ciała, nad wprowadzonym czujnikiem. Inteligentny nadajnik zasila czujnik i przesyła informacje na temat poziomu glukozy do urządzenia mobilnego w celu wyświetlenia ich w aplikacji Eversense.

**Kalibracja** Odczyt poziomu glukozy we krwi z próbki krwi pobranej z opuszka palca wprowadzony do aplikacji Eversense w celu sprawdzenia dokładności systemu. Istnieją dwie fazy pracy systemu Eversense: faza inicjalizacji, podczas której wymagane są 4 pomiary z opuszka palca, oraz faza codziennej kalibracji, podczas której wymagane jest przeprowadzenie 2 pomiarów z opuszka palca (rano i wieczorem)

**LED** Kontrolka.

**mg/dL** Miligramy na decylitr to jednostka pomiaru, oznaczająca stężenie danej substancji w konkretnej ilości płynu. W niektórych krajach wyniki pomiaru glukozy są przedstawiane w jednostce mg/dL, wskazując ilość glukozy obecnej we krwi w przypadku pomiarów za pomocą glukometru lub też ilość glukozy w płynie tkankowym w przypadku pomiarów przy użyciu systemów CGM, takich jak system Eversense CGM.

**mmol/L** Milimole na litr to jednostka pomiaru, która oznacza stężenie danej substancji w konkretnej ilości płynu. W wielu krajach wyniki pomiaru glukozy są przedstawiane w jednostce mmol/L, wskazując ilość glukozy obecnej we krwi w przypadku pomiarów za pomocą glukometru lub też ilość glukozy w płynie tkankowym w przypadku pomiarów przy użyciu systemów CGM, takich jak system Eversense XL CGM.

**Naruszone urządzenie** Urządzenie (iPhone lub iPod), które zostało zmodyfikowane w celu usunięcia elementów kontrolnych i ograniczeń zainstalowanych przez producenta.

**Płyn tkankowy (ISF)** Płyn znajdujący się między komórkami organizmu. W systemie Eversense XL CGM pomiar glukozy jest wykonywany z próbki płynu tkankowego i porównywany z wynikiem pomiaru glukozy z próbki krwi uzyskanej z opuszka palca.

**Podskórny** Umieszczany pod skórą.

**Połączony czujnik** Czujnik połączony z inteligentnym nadajnikiem.

**Prędkość zmian strzałki trendów** Wskaźniki kierunku i prędkości zmian poziomów glukozy.

**Przeciwwskazanie** Stan lub warunki, w których dana osoba nie powinna używać konkretnego urządzenia.

**RM** Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.

**System zarządzania bazą danych (ZBD) Eversense**  
Aplikacja internetowa kompatybilna z aplikacją Eversense,

w której mogą być przechowywane i wyświetlane dane użytkownika dotyczące poziomu glukozy.

**TK** Tomografia komputerowa.

**Tryb „Nie przeszkadzać” (NP w aplikacji Eversense)**

Po włączeniu aplikacja mobilna przestanie wyświetlać alerty niekrytyczne, a inteligentny nadajnik przestanie przysyłać powiadomienia wibracyjne dotyczące alertów niekrytycznych. Wiele urządzeń mobilnych ma własny tryb „Nie przeszkadzać”. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji producenta.

**Urządzenie przenośne** Smartfon z zainstalowanym systemem operacyjnym obsługującym aplikację Eversense i komunikujący się z inteligentnym nadajnikiem.

**Ustawienie powtarzania** Funkcja wykorzystywana do ustawienia częstotliwości powtarzania alertów.

**Wskazanie „NIS.”** Oznacza, że wartość poziomu glukozy podana przez czujnik jest < 40 mg/dL.

**Wskazanie „WYS.”** Oznacza, że wartość poziomu glukozy podana przez czujnik jest > 400 mg/dL.

**Zakłócenia elektromagnetyczne** Mocne pole energii wygenerowane przez urządzenie elektryczne lub magnetyczne.

**Zdalne monitorowanie** Funkcja dodatkowa umożliwiająca zaproszenie innych osób do przeglądania danych CGM używających Eversense NOW, oddzielnej aplikacji pobranej na zgodne urządzenie przenośne.

# I. Wprowadzenie

*Rozdział zawiera informacje dotyczące sposobu użytkowania, przeznaczenia oraz elementów składowych systemu Eversense XL CGM.*

Gratulujemy wyboru najnowocześniejszego urządzenia do kontrolowania cukrzycy. System Eversense XL CGM z czujnikiem o wydłużonej trwałości Eversense XL jest przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia glukozy przez cały okres jego funkcjonowania. System gromadzi informacje dotyczące stężenia glukozy i przesyła je automatycznie do Twojego urządzenia przenośnego. Należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia w celu ustalenia terminu wszczepienia i usunięcia czujnika.

## **Pomoc techniczna**

Niniejszą instrukcję należy przeanalizować ze swoim lekarzem prowadzącym. W przypadku dodatkowych pytań lub w problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, pod numerem infolinii 801 - 080 - 104. Użytkownicy przebywający poza granicami kraju mogą skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Dane kontaktowe lokalnych dystrybutorów znajdują się na stronie internetowej [www.eversensedibabetes.com](http://www.eversensedibabetes.com).

## Elementy systemu Eversense XL CGM

W skład systemu wchodzi elementy: 1) mały czujnik umieszczany przez pracownika służby zdrowia pod skórą w górnej części ramienia, 2) zdejmowany inteligentny nadajnik mocowany nad czujnikiem podskórnym, 3) aplikacja mobilna wyświetlająca wyniki pomiarów glukozy.

### Czujnik Eversense XL

Czujnik wprowadzany tuż pod skórę (w górnej części ramienia) mierzy stężenie glukozy w płynie śródtkankowym. Wartości stężenia glukozy obliczane są przez inteligentny nadajnik i przesyłane do aplikacji. Czujnik Eversense XL pracuje do 180 dni. System będzie wysyłać powiadomienia do aplikacji na urządzeniu przenośnym pozwalając tym samym zaplanować z wyprzedzeniem wymianę czujnika.



Czujnik

### Inteligentny nadajnik Eversense XL

Zdejmowany inteligentny nadajnik noszony jest przez użytkownika nad czujnikiem i służy do zasilania czujnika. Inteligentny nadajnik bezprzewodowo (przez połączenie Bluetooth) przesyła dane dotyczące stężenia glukozy do aplikacji w urządzeniu przenośnym. Inteligentny nadajnik generuje odczuwalne dla użytkownika alerty wibracyjne, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Inteligentny nadajnik wyposażony jest w baterię. Czas eksploatacji nadajnika wynosi 1 rok.




Inteligentny nadajnik

## Aplikacja Eversense

Aplikacja Eversense to oprogramowanie instalowane na urządzeniu przenośnym (np. smartfonie czy tablecie), wyświetlające na kilka sposobów dane dotyczące poziomu glukozy. Inteligentny nadajnik generuje odczuwalne dla użytkownika alerty wibracyjne, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.

Układ ekranów aplikacji Eversense zmienia się w zależności od modelu i/lub systemu operacyjnego urządzenia przenośnego. Niniejsza instrukcja użytkownika zawiera kilka przykładów takich różnic.

**Należy upewnić się, że urządzenie przenośne używa najnowszej wersji systemu operacyjnego.**

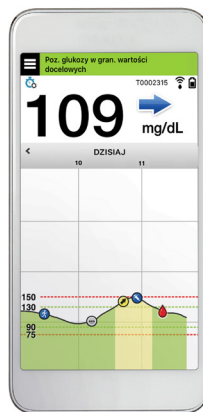

iOS



Android

**WAŻNE:** aby korzystać z systemu Eversense XL CGM, trzeba umieć pobrać i zainstalować aplikację na swoim urządzeniu przenośnym. Dane z inteligentnego nadajnika Eversense XL są przesyłane bezprzewodowo przez łącze Bluetooth. Należy uważnie przeczytać zalecenia w niniejszej instrukcji użytkownika dotyczące pobierania i instalowania aplikacji mobilnej Eversense XL oraz parowania urządzenia przenośnego z inteligentnym nadajnikiem. Jeżeli którykolwiek z fragmentów niniejszej instrukcji użytkownika jest niejasny, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

W skład systemu wchodzi przylepce jednorazowego użytku, dostarczane przez pracownika służby zdrowia po wszczęciu czujnika. Przylepiec z jednej strony przylega do tylnej części inteligentnego nadajnika, zaś druga przylepna warstwa z silikonu przylega do skóry.

## **Omówienie systemu Eversense XL**

Do skalibrowania systemu Eversense XL CGM oraz do podejmowania decyzji dotyczących leczenia wymagany jest odrębny system monitorowania poziomu glukozy we krwi (niedostarczany przez firmę Senseonics). Komponenty systemu zapewniają ciągłe monitorowanie poziomu glukozy we krwi przez cały czas eksploatacji czujnika, pod warunkiem prawidłowego użytkowania.

W celu zapewnienia otrzymywania ciągłych odczytów poziomu glukozy i innych informacji należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących codziennego użytkowania systemu:

- ✓ Inteligentny nadajnik należy nosić przy sobie przez cały czas, z wyjątkiem przerwy na ładowanie baterii.
- ✓ Inteligentny nadajnik jest odporny na działanie wody do głębokości 1 metr przez 30 minut. Narażenie nadajnika na takie warunki przez dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem i unieważnieniem gwarancji.
- ✓ Należy upewnić się, że bateria inteligentnego nadajnika jest przez cały czas odpowiednio naładowana.
- ✓ Należy codziennie wykonywać dwa testy kalibracyjne po otrzymaniu przypomnienia.
- ✓ Należy zwracać uwagę na alerty i powiadomienia wysyłane przez inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne.
- ✓ Przyklepiec nadajnika należy wymieniać codziennie.
- ✓ Nadajnik można zdjąć z ramienia w dowolnej chwili, z wyjątkiem momentu kalibracji. Należy pamiętać, że w przypadku braku łączności między czujnikiem i nadajnikiem nie są gromadzone żadne dane. Po ponownym przymocowaniu nadajnika nad czujnikiem należy odczekać 10 minut do czasu ponownego nawiązania połączenia i pojawienia się odczytów poziomu glukozy w aplikacji.
- ✓ Jeżeli inteligentny nadajnik jest poza zasięgiem urządzenia przenośnego, dane zgromadzone przez inteligentny nadajnik są zapisywane i przesyłane do aplikacji po ponownym znalezieniu się urządzenia przenośnego w zasięgu nadajnika.
- ✓ Czujnik i inteligentny nadajnik można bezpiecznie przenosić przez bramki wykrywacza metali na lotnisku. W czasie lotu inteligentny nadajnik zachowuje się tak, jak wszystkie inne urządzenia Bluetooth. Należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa określonych przez linię lotniczą.



## Funkcje systemu Eversense XL CGM:

- Bezprzewodowa łączność z czujnikiem, inteligentnym nadajnikiem i aplikacją.
- Długo działający czujnik noszony w obrębie ramienia przez cały czas eksploatacji.
- Generowanie alertów po osiągnięciu skonfigurowanych poziomów niskiego i wysokiego poziomu glukozy (hipoglikemii i hiperglikemii).
- Alerty przewidywania mają na celu ostrzeżenie użytkownika systemu **przed** zbliżającymi się alertami niskiego lub wysokiego poziomu glukozy.
- Wyświetlanie odczytów wartości poziomu glukozy na wyświetlaczu urządzenia przenośnego (np. smartfona).
- Alerty wibracyjne odczuwane na ciele użytkownika i generowane przez inteligentny nadajnik nawet w przypadku gdy urządzenie przenośne nie znajduje się w pobliżu.
- Odczyty w zakresie 40–400 mg/dL, podawane co 5 minut.
- Strzałki trendów informujące o wzroście lub spadku poziomu glukozy oraz o tempie zachodzących zmian.
- Wykresy i dane statystyczne przedstawiające wyniki pomiarów poziomu glukozy w łatwych do odczytu formatach.
- Wymienny inteligentny nadajnik z możliwością wielokrotnego ładowania.
- Możliwość wprowadzania zdarzeń (np. posiłków, ćwiczeń i podawanej insuliny).
- Zapisywanie danych dotyczących poziomu glukozy w aplikacji i inteligentnym nadajniku.
- Oferuje możliwość zdalnego monitorowania danych innym osobom używającym aplikacji mobilnej Eversense NOW.

## 1 Wymagania systemowe

- System Eversense XL CGM.
- Zgodny smartfon z systemem Android bądź Apple iPhone®, iPod® lub iPad® wyposażony w funkcję Bluetooth Smart (lub Bluetooth Low Energy). Aplikacja Eversense XL działa też na urządzeniu Apple Watch®. Pełny wykaz zgodnych urządzeń i systemów operacyjnych zamieszczono na stronie <https://global.eversensediabates.com/compatibility>.
- Wykaz zgodnych urządzeń zamieszczono na stronie <https://global.eversensediabates.com/compatibility>.
- Aplikację systemu Eversense XL CGM na urządzenie przenośne można pobrać ze sklepu Apple App Store lub Google Play™.

## Licencja dla użytkownika końcowego i polityka prywatności

Użytkowanie aplikacji Eversense XL podlega warunkom najnowszej licencji dla użytkownika końcowego i polityki prywatności dotyczącej aplikacji Eversense XL. Dokumenty te są okresowo zmieniane i publikowane na stronie <https://global.eversensediabates.com/>.

## Urządzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu

NIE WOLNO używać aplikacji Eversense XL na urządzeniach iPhone lub iPod poddanych nieautoryzowanym modyfikacjom systemu. Urządzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu nie zapewniają użytkownikowi wystarczającego poziomu bezpieczeństwa ani precyzji, nie zostały też zatwierdzone przez firmę Senseonic.

## Uszkodzony ekran lub przycisk

Jeśli ekran Twojego urządzenia przenośnego jest uszkodzony lub przyciski nie działają, używanie systemu Eversense XL może być niemożliwe i informacje o zdarzeniach hipo- i hiperglikemii mogą nie być wyświetlane.

## Wskazania do stosowania

System Eversense XL CGM służy do ciągłego pomiaru poziomu glukozy w płynie tkankowym, za pomocą czujnika, u osób dorosłych (w wieku co najmniej 18 lat) chorujących na cukrzycę.

System przeznaczony jest do:

- wspomagania kontrolowania cukrzycy,
- podawania odczytów wartości poziomu glukozy w czasie rzeczywistym,
- dostarczania informacji o trendach glikemicznych,
- generowania alertów ostrzegających o wykryciu lub przewidywaniu epizodów hipoglikemii (niskiego stężenia glukozy) i hiperglikemii (wysokiego stężenia glukozy).

Interpretacja danych historycznych z systemu ułatwia wprowadzanie zmian w leczeniu. Zmiany te powinny opierać się na wzorcach i trendach obserwowanych w czasie.

System przeznaczony jest do użytku jako urządzenie dodatkowe, które uzupełnia informacje pozyskiwane ze standardowych urządzeń do monitorowania poziomu glukozy we krwi. Nie zastępuje jednak tych urządzeń.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI

U pacjenta z tym urządzeniem można bezpiecznie wykonać skanowanie w poziomym skanerze MR z systemem zamkniętym, spełniającym następujące warunki:

- Statyczne pole magnetyczne 1,5 T lub 3,0 T.
- Maksymalny przestrzenny gradient pola 1900 gausów/cm ( $\leq 19$  T/m)
- Maksymalny zgłaszany dla systemu MR, uśredniony współczynnik absorpcji swoistej (SAR) dla całego ciała wynoszący 4 W/kg (kontrolowany tryb pracy pierwszego poziomu) przez 15 minut ciągłego skanowania lub SAR wynoszący 2 W/kg przez 30 minut ciągłego skanowania

W warunkach skanowania zdefiniowanych powyżej wyniki badań nieklinicznych wskazują, że czujnik Eversense może spowodować maksymalny wzrost temperatury o mniej niż 5,4°C.

W badaniach nieklinicznych artefakt obrazu spowodowany przez urządzenie ma zasięg około 2,83 cala (72 mm) od czujnika Eversense, gdy jest obrazowany sekwencją impulsów echa gradientowego i systemem MR 3T.

Czujnik Eversense nie był testowany w systemach MR, które nie spełniają powyższych warunków. Narażenie czujnika Eversense na warunki MRI, które nie mieszczą się w warunkach opisanych powyżej, może spowodować potencjalne powikłania, takie jak migracja urządzenia, ogrzanie i uszkodzenie tkanki lub erozja przez skórę.

Inteligentny nadajnik Eversense nie jest bezpieczny dla rezonansu magnetycznego i NALEŻY go WYJĄĆ przed poddaniem się procedurze rezonansu magnetycznego. Przed poddaniem się badaniu MRI powiedz personelowi MRI, że masz wszczepiony czujnik Eversense i inteligentny nadajnik.

Możesz podzielić się tą informacją z personelem MRI.

Aby uzyskać najnowszą wersję etykiet systemu Eversense CGM, odwiedź stronę <https://global.eversensediabesity.com/>.

## Przeciwwskazania

- System jest przeciwwskazany u osób, u których stosowanie deksametazonu lub octanu deksametazonu jest przeciwwskazane.
- Inteligentny nadajnik jest niekompatybilny z badaniami rezonansem magnetycznym (MRI). Pacjenci noszący inteligentny nadajnik nie powinni poddawać się badaniu rezonansem magnetycznym. Aby uzyskać informacje na temat czujnika, zobacz punkt Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI.
- Mannitol lub sorbitol, podawane dożylnie lub jako składnik roztworu do irygacji lub dializy otrzewnowej, mogą podwyższać stężenie mannitolu lub sorbitolu we krwi i powodować fałszywie podwyższone odczyty poziomu glukozy podawane przez czujnik. Sorbitol jest stosowany w niektórych sztucznych słodzikach, ale poziom jego stężenia we krwi na skutek spożycia w ramach typowej diety nie wpływa na odczyty poziomu glukozy podawane przez czujnik.

## Zawartość opakowania

Zestaw inteligentnego nadajnika Eversense XL zawiera elementy:



Inteligentny nadajnik  
Eversense XL



Stacja dokująca



Zasilacz  
(kabel USB i zasilacz AC)

Opakowanie zawiera także niniejszą instrukcję użytkownika i skróconą instrukcję obsługi (niepokazane).

## Korzystanie z instrukcji użytkownika

Instrukcja opisuje sposób korzystania z systemu Eversense XL CGM. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

- Wszelkie **ostrzeżenia** i **przestrogi** zostały wyszczególnione w ramkach.
- Porady dla użytkownika poprzedzone zostały symbolem ✓.

## 2. Korzyści i zagrożenia

*Rozdział opisuje korzyści, oczekiwania i zagrożenia związane z użytkowaniem systemu Eversense XL CGM.*

Ciągłe monitorowanie poziomu glukozy pomaga w leczeniu cukrzycy i kontrolowaniu poziomu glukozy, co wpływa na poprawę jakości życia użytkownika systemu. Najlepsze rezultaty osiąga się po uzyskaniu pełnych informacji na temat zagrożeń i korzyści, procedury wszczepiania, wymagań kontrolnych i obowiązków użytkownika systemu. Nie należy wszczepiać czujnika bez dogłębnej znajomości obsługi systemu Eversense XL CGM.

System CGM dokonuje pomiaru glukozy w płynie tkankowym (ISF) wypełniającym przestrzeń pomiędzy komórkami ciała. Fizjologiczne różnice pomiędzy ISF i krwią pobraną z opuszka mogą być powodem różnic w pomiarach glukozy. Różnice te są szczególnie widoczne w okresach gwałtownych zmian stężenia glukozy we krwi (np. po jedzeniu, podaniu insuliny lub ćwiczeniach) oraz u niektórych osób w ciągu pierwszych kilku dni po wszczepieniu, z powodu stanu zapalnego, który może wynikać z zabiegu wszczepienia. Wartości poziomu glukozy w ISF zmieniają się z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wartości poziomu glukozy we krwi.

Czujnik wyposażony jest w silikonowy pierścień z niewielką ilością leku steroidowego o działaniu przeciwzapalnym (octan deksametazonu). Nie ustalono, czy zagrożenia związane z octanem deksametazonu podanym we wstrzyknięciu dotyczą octanu deksametazonu uwalnianego z pierścienia w czujniku. Pierścień uwalnia niewielkie ilości octanu deksametazonu po kontakcie czujnika z płynami ustrojowymi. Lek służy do łagodzenia odpowiedzi zapalnej organizmu na wprowadzony podskórnie czujnik. Octan deksametazonu w pierścieniu może też powodować inne działania niepożądane, których nie zaobserwowano po podaniu leku we wstrzyknięciu. Wykaz potencjalnie szkodliwych skutków związanych z octanem deksametazonu można uzyskać od pracownika służby zdrowia.

Nieuprawnione modyfikowanie urządzeń, uzyskiwanie niewłaściwego dostępu do informacji w urządzeniu lub poddanie urządzenia przenośnego nieautoryzowanym modyfikacjom systemu oraz wykonywanie innych nieuprawnionych czynności może skutkować nieprawidłowym działaniem systemu Eversense XL CGM i stwarzać zagrożenie dla jego użytkownika. Nieuprawnione modyfikowanie urządzeń nie jest dozwolone i skutkuje unieważnieniem gwarancji.

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z użytkowaniem urządzenia, należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi w państwie członkowskim.

## Zagrożenia i działania niepożądane

Alerty dźwiękowe poziomu glukozy i powiadomienia nie będą emitowane, jeżeli dźwięk w urządzeniu przenośnym będzie wyłączony. Jeżeli system nie może wyświetlić wartości glukozy, nie może również wygenerować alertów poziomu glukozy. Jeżeli użytkownik systemu nie może wyczuć wibracji inteligentnego nadajnika, może nie zauważyć generowanych alertów. Wartości poziomu glukozy obliczane przez system mogą nieco odbiegać od podawanych przez glukometr. Może to powodować aktywację alertu w innym czasie niż w przypadku, gdyby wartości podawane przez system zawsze odpowiadały wartościom podawanym przez glukometr.

Jeżeli użytkownik systemu nie wykonuje częstych pomiarów poziomu glukozy we krwi i pomija alert, może nie zdawać sobie sprawy z wysokiego lub niskiego poziomu glukozy. Użytkownik systemu może wymagać pomocy medycznej, gdy nie jest świadomy wystąpienia u siebie zdarzenia hiperglikemii lub hipoglikemii.

Jeżeli użytkownik systemu nie sprawdza wartości poziomu glukozy za pomocą glukometru po wystąpieniu objawów hipoglikemii lub hiperglikemii lub jeżeli objawy nie odpowiadają odczytom czujnika, może nie zorientować się, że wystąpiła u niego hiperglikemia lub hipoglikemia. Decyzje dotyczące leczenia bez potwierdzenia poziomu glukozy przy użyciu glukometru mogą skutkować wysokim lub niskim poziomem glukozy, jako że wartości poziomu glukozy we krwi mogą się lekko różnić od wartości zmierzonych przez czujnik w płynie śródtkankowym.

Wszczepienie czujnika polega na wykonaniu niewielkiego nacięcia i umieszczeniu urządzenia pod skórą. Wszczepienie może powodować infekcję, ból, podrażnienie skóry, zasinienie, odbarwienie lub atrofie skóry. Zawroty głowy, omdlenia i nudności były zgłaszane w niewielkiej liczbie przypadków podczas badań klinicznych, podobnie jak przypadki uszkodzenia czujnika lub nieusunięcia go przy pierwszej próbie. Ponadto przyklepic może wywołać reakcję skórną lub podrażnienie skóry. Wszelkie problemy medyczne związane z procedurą lub użytkowaniem urządzenia należy zgłaszać swojemu lekarzowi.

## Ostrzeżenia

- System Eversense CGM nie był testowany w miejscach wszczepienia innych niż ramię.
- Jeżeli w dowolnym momencie wystąpią objawy niskiego lub wysokiego poziomu glukozy lub jeżeli objawy nie odpowiadają odczytom wartości wykrywanym przez czujnik, należy zbadać poziom glukozy za pomocą glukometru.
- Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii należy zawsze sprawdzać poziom glukozy za pomocą glukometru.
- **NIE NALEŻY** używać uszkodzonego lub pękniętego inteligentnego nadajnika, ponieważ mogłoby to stworzyć niebezpieczeństwo elektryczne lub awarię oraz prowadzić do porażenia prądem.
- Bliski kontakt z bezpośrednim źródłem zakłóceń elektromagnetycznych może wpływać na możliwość przesyłania danych z nadajnika do urządzenia przenośnego. Należy odsunąć się od źródła zakłóceń elektromagnetycznych i sprawdzić, czy urządzenie przenośne jest połączone z inteligentnym nadajnikiem.
- Tetracykliny mogą fałszywie zaniżać odczyty poziomu glukozy podawane przez czujnik. W przypadku przyjmowania tetracyklin należy zawsze sprawdzać poziom glukozy, dokonując pomiaru przy użyciu glukometru.
- Przed przyklejeniem inteligentnego nadajnika nad czujnikiem miejsce nacięcia należy zawsze osłaniać jałowym bandażem aż do momentu wygojenia rany. W przeciwnym razie może dojść do zakażenia w miejscu nacięcia.
- Niniejszą instrukcję należy przeanalizować ze swoim lekarzem. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących produktu Eversense XL oraz w przypadku problemów z urządzeniem, prosimy o kontakt działem obsługi klienta pod numerem infolinii 801-080-104. Użytkownicy przebywający poza granicami kraju mogą skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. Dane kontaktowe lokalnych dystrybutorów Eversense XL znajdują się na [www.eversense.com](http://www.eversense.com).
- System należy zawsze kalibrować wyłącznie z użyciem próbki krwi pobranej z opuszka palca. **NIE NALEŻY** stosować odczytu poziomu glukozy z krwi pobranej z innych miejsc (np. z przedramienia lub dłoni) do kalibracji systemu.



## Ostrzeżenia

- **NIE NALEŻY** wprowadzać zestawu infuzyjnego w promieniu 10,16 cm od miejsca wszczepienia czujnika. Jeżeli miejsce podawania insuliny znajduje się w promieniu 10,16 cm od miejsca wszczepienia czujnika, może dochodzić do zakłócenia odczytów czujnika oraz niedokładnych odczytów.
- Zawsze należy przestrzegać wytycznych personelu służby zdrowia dotyczących pielęgnacji po wszczepieniu lub usunięciu czujnika. W przypadku wystąpienia poniższych sytuacji należy skontaktować się ze swoim pracownikiem służby zdrowia:
  - Ból, zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu wszczepienia czujnika występujący po 5 dniach od dnia wszczepienia lub jego usunięcia nie ustąpiły w ciągu 5–7 dni.
- Jeśli użytkownik jest uczulony na którykolwiek z wymienionych w danych technicznych w tej instrukcji obsługi materiałów użytych w czujniku lub inteligentnym nadajniku, systemu CGM Eversense **NIE WOLNO** używać.

## Przestrogi

- Inteligentny nadajnik jest przeznaczony do użytku tylko przez jednego pacjenta. Użytkownik NIE powinien wymieniać inteligentnych nadajników z innymi osobami. Każdy inteligentny nadajnik można jednocześnie połączyć wyłącznie z jednym czujnikiem.
- Wymienione niżej metody leczenia i zabiegi wykonywane w pobliżu umieszczenia czujnika, mogą powodować uszkodzenie:
  - **Litotrypsja** — zabieg ten nie jest zalecany u pacjentów z wszczepionym czujnikiem, ponieważ wpływ litotrypsji na urządzenie jest niezny.
  - **Diatermia** — NIE NALEŻY stosować diatermii u pacjentów z wszczepionym czujnikiem. Energia generowana podczas diatermii może przenikać przez czujnik i uszkadzać tkankę w miejscu wprowadzenia czujnika.
  - **Elektrokoagulacja** — elektrokoagulacja wykonywana w pobliżu miejsca wszczepienia czujnika może uszkodzić urządzenie. NIE należy stosować elektrokoagulacji w pobliżu czujnika.
- NIE NALEŻY nosić inteligentnego nadajnika podczas badań RTG (obrazowanie za pomocą promieniowania rentgenowskiego) lub TK (obrazowanie metodą tomografii komputerowej). Aby uniknąć zniekształceń na obrazach, należy zdjąć inteligentny nadajnik przed poddaniem się badaniu RTG lub TK. Należy poinformować pracownika służby zdrowia o inteligentnym nadajniku.
- Czujnik i inteligentny nadajnik powinny zostać połączone w dniu wszczepienia. Niewykonanie tej czynności może opóźnić odbiór odczytów poziomu glukozy.
- Stosowanie leków steroidowych — nie ustalono, czy zagrożenia wiążące się zwykle z octanem deksametazonu podanym w iniekcji dotyczą również octanu deksametazonu uwalnianego z pierścienia, który w sposób kontrolowany i punktowo uwalnia lek. Pierścień z octanem deksametazonu może powodować inne, niewymienione lub wcześniej nieobserwowane działania niepożądane.
- Jeżeli czujnik lub inteligentny nadajnik są ciepłe, pacjent powinien natychmiast zdjąć inteligentny nadajnik i skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia. Ciepły czujnik może oznaczać zakażenie lub awarię urządzenia.

## Przestrogi

- Przed rozpoczęciem ładowania baterii inteligentnego nadajnika należy zdjąć inteligentny nadajnik z ramienia. Nieusunięcie inteligentnego nadajnika podczas ładowania może skutkować porażeniem prądem.
- **NIE NALEŻY** używać aplikacji Eversense XL podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.
- Nie należy poddawać się masażom w pobliżu miejsca umieszczenia czujnika. Masaż wykonywany w okolicy czujnika może powodować dyskomfort lub podrażnienie skóry.
- Do ładowania baterii inteligentnego nadajnika należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB, które dostarczono wraz z inteligentnym nadajnikiem. Korzystanie z innego zasilacza może uszkodzić inteligentny nadajnik, co może uniemożliwić poprawny odbiór odczytów poziomu glukozy, stworzyć ryzyko pożaru oraz skutkować unieważnieniem gwarancji. Jeśli zasilacz sieciowy Eversense lub kabel USB są uszkodzone bądź zostały zgubione, należy się skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.
- W przypadku obaw dotyczących reakcji alergicznej na silikon, przed zastosowaniem należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.
- Po 24 godzinach użytkowania przylepiec należy wyrzucić.
- Aplikacja do zdalnego monitorowania Eversense NOW nie zastępuje schematu monitorowania pomiarów wskazanego przez lekarza prowadzącego.
- System Eversense XL CGM nie został przebadany w następujących populacjach: u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, u osób w wieku poniżej 18 lat, u pacjentów w stanie krytycznym lub hospitalizowanych, u chorych otrzymujących leki immunosupresyjne, chemioterapię lub leki przeciwwzakrzepowe, u osób z innym aktywnym wszczepionym urządzeniem, np. z wszczepionym defibrylatorem (implanty pasywne, np. stenty wieńcowe, są dozwolone), u osób ze stwierdzoną alergią na glikokortykosteroidy stosowane ogólnoustrojowo (w tym podawane w postaci wziewnej, ale z wyłączeniem stosowanych miejscowo, do oczu lub nosa).
- Pomocniczy wyświetlacz Apple Watch służy do wyświetlania danych z systemu Eversense XL CGM i nie należy używać go zamiast wyświetlacza głównego systemu Eversense XL CGM.

## 3. Rozpoczynanie pracy

*Rozdział opisuje czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do codziennego użytkowania systemu Eversense XL CGM. Czynności te może wykonać pracownik służby zdrowia przed wszczęciem czujnika.*

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, potrzebne jest:

- urządzenie przenośne do pobrania aplikacji Eversense XL,
- bezprzewodowe połączenie z Internetem,
- pakiet inteligentnego nadajnika Eversense XL, zawierający inteligentny nadajnik oraz zasilacz.

**Uwaga:** w przypadku nieotrzymania pakietu inteligentnego nadajnika należy pominąć instrukcję pobierania i instalowania aplikacji Eversense XL na urządzeniu przenośnym.

Czynności te można wykonać przed wszczęciem czujnika, aby zapoznać się z systemem.

**Uwaga:** na czas transportu inteligentny nadajnik został ustawiony w tryb uśpienia. Podczas pierwszego ładowania baterii inteligentnego nadajnika tryb pracy zmienia się na aktywny.

### Kroki uruchomienia aplikacji:

1. Pobierz aplikację Eversense XL na urządzenie przenośne.
2. Skonfiguruj aplikację — funkcja Tworzenie konta, Parowanie i Ustawienia.

Po otrzymaniu inteligentnego nadajnika i przed sparowaniem go z urządzeniem przenośnym należy całkowicie go naładować.

## Ładowanie baterii inteligentnego nadajnika

Ważne jest, aby codziennie ładować baterię w celu zagwarantowania zbierania danych i wysyłania ich do aplikacji. Podczas ładowania baterii inteligentny nadajnik nie gromadzi informacji z czujnika i nie wysyła ich do aplikacji. Baterię nadajnika można również ładować, podłączając kabel USB do gniazda USB komputera, zamiast do zasilacza prądu zmiennego. Naładowanie baterii nadajnika w ten sposób może potrwać dłużej.



**Przestroga:** do ładowania baterii inteligentnego nadajnika należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB, które dostarczono wraz z inteligentnym nadajnikiem. Korzystanie z innego zasilacza może uszkodzić inteligentny nadajnik, co może uniemożliwić poprawny odbiór odczytów poziomu glukozy, stworzyć ryzyko pożaru oraz skutkować unieważnieniem gwarancji. Jeśli zasilacz sieciowy Eversense lub kabel USB są uszkodzone bądź zostały zgubione, należy się skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

1. Podłącz standardową końcówkę kabla USB do gniazda USB adaptera.



2. Podłącz końcówkę micro kabla USB do gniazda micro USB stacji dokującej.




**3. Dopasuj cztery złote styki w dolnej części nadajnika do czterech złotych styków w stacji dokującej.**

- Wsuń nadajnik do stacji dokującej.
- Po wsunięciu wciśnij nadajnik tak, aby zablokował się na miejscu.



**4. Podłącz adapter do gniazda zasilania prądem zmiennym.**

- Aby zwolnić inteligentny nadajnik ze stacji dokującej, pociągnij wypustkę i podnieś inteligentny nadajnik ze stacji dokującej.

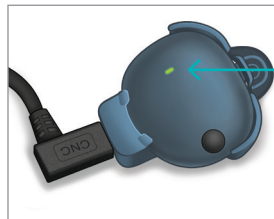

Kontrolka LED  
(świeci się na  
zielono lub  
pomarańczowo)

# Krok 1. Pobranie i zainstalowanie aplikacji

Aplikacja została opracowana tak, aby umożliwiała współpracę z inteligentnym nadajnikiem i wyświetlała dane odbierane z czujnika glukozy

3

1. Wybierz urządzenie przenośne do wyświetlania poziomów glukozy.  
W większości przypadków będzie to smartfon.



2. Pobierz bezpłatną aplikację Eversense XL z Apple App Store lub Google Play.

Instrukcje instalacji będą różne dla systemów iOS i Android.



Ikona aplikacji  
Eversense XL

**Uwaga:** należy upewnić się, że urządzenie przenośne używa najnowszej wersji systemu operacyjnego.

3. Na ekranie instalacji wybierz opcję **Zainstaluj aplikację** i wykonuj dalsze polecenia.

Po upływie 1–2 minut sprawdź, czy ikona aplikacji Eversense XL (po lewej) pojawiła się na ekranie urządzenia przenośnego.

**WAŻNE:** przed wykonaniem dalszych czynności należy się upewnić, że bezprzewodowe połączenie z Internetem oraz łączność Bluetooth są włączone.

## Krok 2. Skonfigurowanie aplikacji – Założenie konta, Parowanie i Ustawienia


Po pobraniu aplikacji na urządzenie przenośne należy połączyć ją z inteligentnym nadajnikiem przez sparowanie.

### 1. Zostanie wyświetlona pełna wersja **LICENCJI DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO**.

Zapoznaj się z nią i zaakceptuj.

Zostanie wtedy wyświetlone podsumowanie Licencji dla użytkownika końcowego.

- Potwierdź je, wybierając opcję **Akceptuj**.

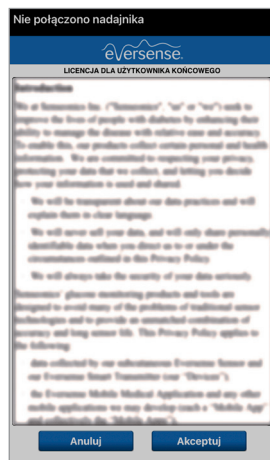

Po zapoznaniu się z Polityką prywatności, klikając przycisk „Akceptuję”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dotyczących zdrowia – w celu ich wykorzystania przez firmę Senseonics w celu świadczenia i obsługi Produktów i usług Senseonics.

Anuluj

Akceptuj

### 2. Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej pojawi się monit o utworzenie i zarejestrowanie konta z użyciem adresu e-mail i hasła.


- Przed zalogowaniem się na konto należy je zarejestrować. Wybierz opcję **Utwórz konto**.



**Uwaga:** zapomniane hasło można zresetować z poziomu aplikacji. W przypadku zapomnienia adresu e-mail skojarzonego z kontem należy skontaktować się z działem obsługi klienta.




3. Wpisz dane konta i wybierz opcję **Zarejestruj**.

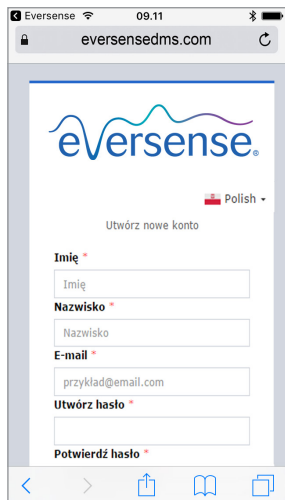

4. Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie wybierz opcję **ZALOGUJ SIĘ**. Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz pozycję **OK**.


**Uwaga:** ekran logowania rozróżnia duże i małe litery.

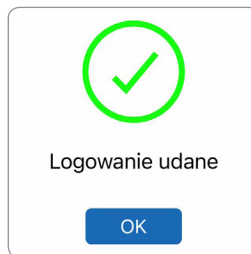

## 5. Po zakończeniu rejestracji i zalogowaniu pojawi się ekran **WITAJ**.





## 6. Wybierz jedną z dwóch opcji, w zależności do tego, czy masz już inteligentny nadajnik, czy jeszcze nie:

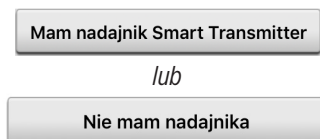


(przejdź do kroku 12).

## Użytkownicy systemu Android muszą tylko włączyć usługi lokalizacji.

- Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić, że wymagany jest dostęp do usług lokalizacji na połączenie Bluetooth.
- Następnie wybierz opcję **Zezwalaj**, aby upewnić się, że otrzymasz alerty, gdy aplikacja jest używana lub działa w tle.

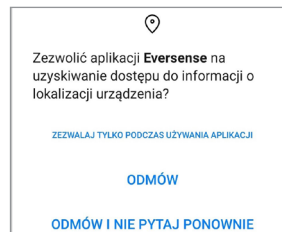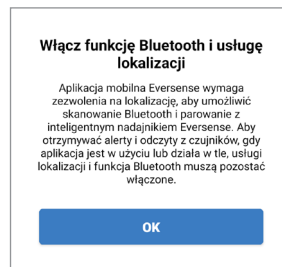

**Uwaga:** System operacyjny Android 12 i nowsze mogą wyświetlać okno podręczne z innym żądaniem pozwolenia.

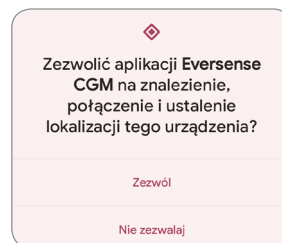


7. Po włączeniu inteligentnego nadajnika i pojawieniu się ekranu **SPARUJ SWÓJ NADAJNIK** ustaw inteligentny nadajnik w tryb „Widoczny” w celu umożliwienia urządzeniu przenośnemu wykrycia inteligentnego nadajnika:

- Trzykrotnie wciśnij przycisk włączania zasilania inteligentnego nadajnika. Upewnij się, że inteligentny nadajnik nie jest podłączony do zasilacza.
- Kontrolka LED będzie migać na zielono i pomarańczowo, co oznacza, że inteligentny nadajnik pracuje w trybie „Widoczny”.



**Uwaga:** jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania na inteligentnym nadajniku nie zapali się kontrolka LED, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 5 sekund, aby uruchomić nadajnik.


8. Na ekranie **SPARUJ SWÓJ NADAJNIK** przy identyfikatorze inteligentnego nadajnika wyświetla się „Nie połączono”. (Identyfikator inteligentnego nadajnika jest identyczny z numerem seryjnym na tylnej ścianie inteligentnego nadajnika). Wybierz opcję **Nie połączono**, aby rozpocząć proces parowania.

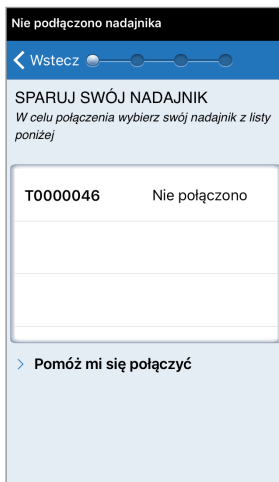

9. Pojawi się ekran wyskakujący **ŻĄDANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH**.


Wybierz opcję **Połącz**, aby ukończyć proces parowania.

**Uwaga:** inteligentny nadajnik można sparować tylko z jednym urządzeniem jednocześnie.

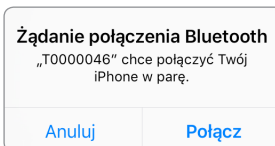


10. Po zakończeniu parowania obok identyfikatora inteligentnego nadajnika pojawi się komunikat „Połączono”. Inteligentny nadajnik będzie przysyłał wibracje do czasu połączenia go z wszczepionym czujnikiem (zob. *Wszczepianie i łączenie czujnika*).

- Wybierz opcję **Dalej**.

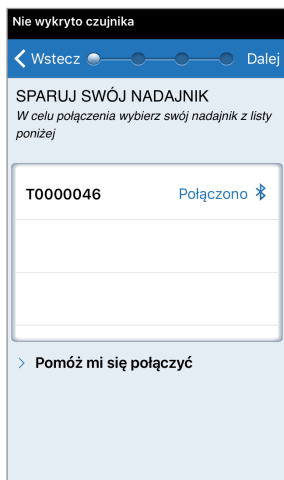


11. Ekran **CODZIENNA KALIBRACJA** będzie wyświetlany dwa razy dziennie, rano i wieczorem, przypominając o konieczności przeprowadzenia kalibracji. Użytkownik automatycznie informowany jest o porze przeprowadzenia niezbędnej kalibracji.

- Wybierz opcję **Rano**, aby zmienić godzinę kalibracji, a następnie zrób to samo w odniesieniu do opcji **Wieczór**.
- Po zakończeniu wybierz opcję **Dalej**.

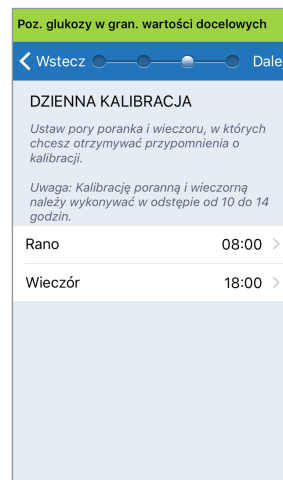


12. Ekran **JEDNOSTKA MIARY** informuje o standardowej jednostce miary stosowanej przez użytkownika. Wartości pomiaru glukozy będą wyświetlane w ustawionych jednostkach miary.

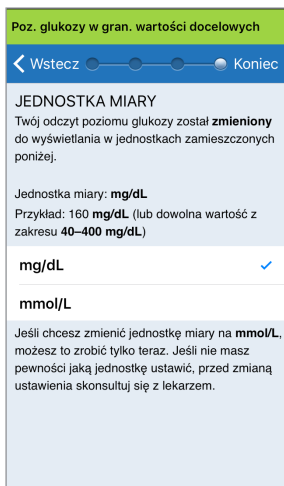

**Uwaga:** NIE WOLNO zmieniać jednostki miary bez konsultacji z pracownikiem służby zdrowia. Po potwierdzeniu jednostki miary wybierz opcję **Koniec**.

13. Pojawi się ekran **MOJA GLUKOZA**. W tym momencie ekran nie będzie zawierał żadnych danych do wyświetlenia.

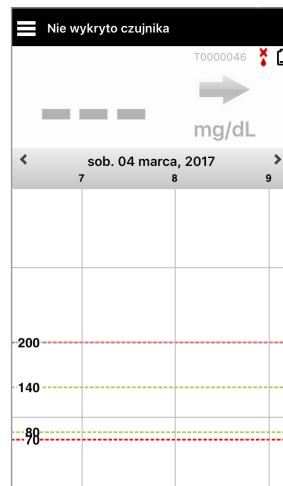

**Uwaga:** po połączeniu czujnika z inteligentnym nadajnikiem zniknie czerwona kropla krwi ze znakiem X i pojawi się czarna kropla krwi ze wskaźnikiem siły sygnału.

Po wszczepieniu czujnika przez pracownika służby zdrowia oraz po zakończeniu 24-godzinnej fazy nagrzewania można przystąpić do kalibracji. Nawet jeśli czujnik nie jest wprowadzony, należy przejrzeć niniejszą instrukcję użytkownika w celu zapoznania się z aplikacją i jej funkcjami.

## 4. Wszczepienie i łączenie czujnika

Rozdział opisuje metodę łączenia czujnika z inteligentnym nadajnikiem po wszczepieniu czujnika przez pracownika służby zdrowia. Tylko Personel pracownik zdrowia może wprowadzić czujnik pacjentowi. Więcej informacji zawiera rozdział „Informacje o czujniku”.


Jeżeli użytkownik otrzymał inteligentny nadajnik bezpośrednio, powinien przynieść go wraz z urządzeniem przenośnym na umówioną wizytę u lekarza. Po wszczepieniu czujnika przez pracownika służby zdrowia inteligentny nadajnik oraz czujnik należy połączyć w celu rozpoczęcia fazy nagrzewania. Inteligentny nadajnik można jednocześnie połączyć wyłącznie z jednym czujnikiem.

1. Upewnij się, że inteligentny nadajnik jest włączony (zob. *Użytkowanie inteligentnego nadajnika*) oraz że urządzenie przenośne jest połączone z Internetem.
  - Ustaw inteligentny nadajnik bezpośrednio nad wszczepionym czujnikiem, do czasu aż strona **Przewodnik umieszczania** w aplikacji pokaże połączenie. Stronę Przewodnik umieszczania można wyświetlić, wybierając kolejno opcje **Menu** > **Przewodnik umieszczania**.




2. Po potwierdzeniu sygnału wyjdź ze strony Przewodnik umieszczania i przejdź do ekranu Menu główne.

**Uwaga:** połączenie między czujnikiem i inteligentnym nadajnikiem jest wrażliwe na zorientowanie nadajnika. Jeżeli inteligentny nadajnik umieszczono bezpośrednio nad czujnikiem, a strona Przewodnik umieszczania wskazuje na brak połączenia, należy spróbować obrócić inteligentny nadajnik nieznacznie w lewo lub w prawo, tak aby ikona zasilania i kontrolka LED były ułożone równolegle do czujnika.

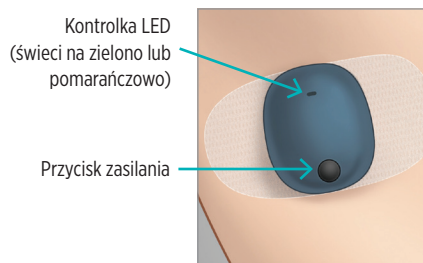


3. Aby połączyć inteligentny nadajnik z czujnikiem, wybierz opcję **Połącz czujnik** na ekranie wyskakującym **Wykryto nowy czujnik** lub wybierz opcję **Menu > Ustawienia > System > Połączony czujnik**, a następnie wybierz opcję **Połącz wykryty czujnik**.

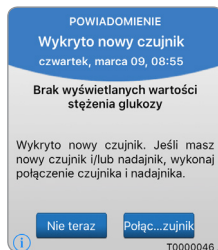


### Uwaga:

powiadomienie  
Wykryto nowy  
czujnik może zostać  
wyświetlone nawet  
po 5 minutach.

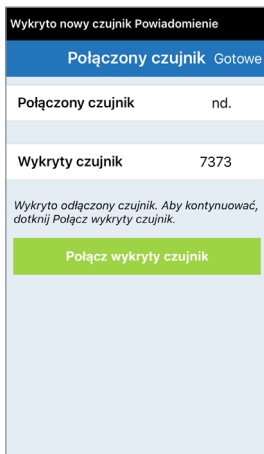

4. Rozpocznie się proces łączenia. Po zakończeniu każdego etapu zostanie wyświetlony symbol zaznaczenia. Proces łączenia trwa do 10 minut. **NIE WOLNO** zdejmować inteligentnego nadajnika znad miejsca wszczepienia czujnika do czasu wyświetlenia trzeciego symbolu zaznaczenia.

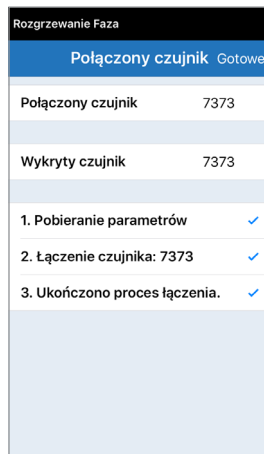


Umieść nadajnik nad sensorem aby zakończyć powiązanie. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.

OK

W przypadku zdjęcia inteligentnego nadajnika z miejsca wszczepienia czujnika system wyświetli powiadomienie.

**Przestroga:** czujnik i inteligentny nadajnik powinny zostać połączone w dniu wszczepienia. Niewykonanie tej czynności może opóźnić odbiór odczytów poziomu glukozy.

**Uwaga:** czujnik wymaga przeprowadzenia 24-godzinnej fazy nagrzewania w celu ustabilizowania się w organizmie przed rozpoczęciem pobierania wartości pomiarów glukozy przez inteligentny nadajnik. W fazie nagrzewania nie trzeba inteligentnego nadajnika. Noszenie inteligentnego nadajnika w tym czasie skutkuje jedynie wyświetleniem w aplikacji komunikatu o trwającej fazie nagrzewania. Po zakończeniu fazy nagrzewania należy włączyć inteligentny nadajnik i umieścić go nad czujnikiem za pomocą przylepca Eversense. System przypomni o obowiązku przeprowadzenia kalibracji przy użyciu aplikacji.

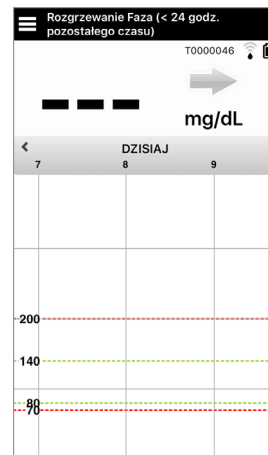

**WAŻNE:** jeżeli inteligentny nadajnik nie jest włączony, sparowany z aplikacją Eversense XL i połączony z czujnikiem, system nie przypomni użytkownikowi o kalibracji.



# 5. Użytkowanie inteligentnego nadajnika


*Rozdział opisuje funkcje inteligentnego nadajnika oraz metodę uzyskiwania nieprzerwanego i ciągłego monitorowania poziomów glukozy.*

Aby dostarczać informacje do systemu Eversense XL CGM, inteligentny nadajnik użytkownika systemu komunikuje się zarówno z czujnikiem, jak i z aplikacją.

5

Inteligentny nadajnik Eversense XL:

- Zasilą czujnik.
- Oblicza i przechowuje dane dotyczące poziomu glukozy.
- Wysyła alerty wyczuwalne przez użytkownika systemu po przekroczeniu ustawionych poziomów glukozy.
- Wysyła dane o poziomie glukozy do aplikacji przez łącze Bluetooth.
- Nadajnik można ładować, umieszczając go w stacji dokującej.
- Przesyła dane do zgodnych aplikacji zewnętrznych przez gniazdo USB.
- Wielokolorowa kontrolka LED wskazuje różne tryby pracy inteligentnego nadajnika.
- Komunikuje się z urządzeniem przenośnym.
- Może być włączony lub wyłączony.

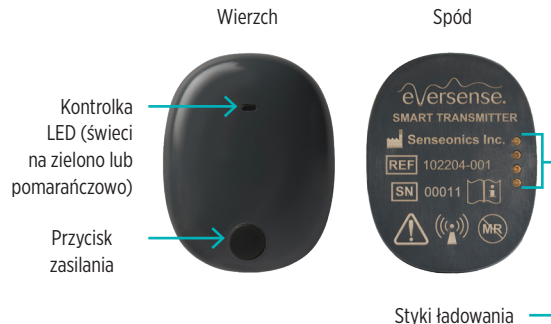

## Codzienne użytkowanie

W celu otrzymywania ciągłych odczytów o stężeniach glukozy, korzystając z inteligentnego nadajnika, należy:

- ✓ Inteligentny nadajnik należy nosić przy sobie przez cały czas, z wyjątkiem przerwy na ładowanie baterii.
- ✓ Inteligentny nadajnik jest odporny na działanie wody do głębokości 1 m przez 30 minut. Narażenie nadajnika na takie warunki przez dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem i unieważnieniem gwarancji.
- ✓ Należy upewnić się, że bateria inteligentnego nadajnika jest przez cały czas odpowiednio naładowana.
- ✓ Należy codziennie wykonywać dwa testy kalibracyjne po otrzymaniu przypomnienia.
- ✓ Należy zwracać uwagę na alerty i powiadomienia wysyłane przez inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne.
- ✓ Należy zmieniać codziennie przylepiec mocujący inteligentny nadajnik.
- ✓ Nadajnik można zdjąć z ramienia w dowolnej chwili, z wyjątkiem momentu kalibracji. Należy pamiętać, że w przypadku braku łączności między czujnikiem i nadajnikiem nie są gromadzone żadne dane. Po ponownym przymocowaniu nadajnika nad czujnikiem należy odczekać 10 minut do czasu ponownego nawiązania połączenia i pojawienia się odczytów poziomu glukozy w aplikacji.
- ✓ Jeżeli inteligentny nadajnik jest poza zasięgiem urządzenia przenośnego, dane zgromadzone przez inteligentny nadajnik są zapisywane i przesyłane do aplikacji po ponownym znalezieniu się urządzenia przenośnego w zasięgu nadajnika.
- ✓ Czujnik i inteligentny nadajnik można bezpiecznie przenosić przez bramki wykrywacza metali na lotnisku. W czasie lotu inteligentny nadajnik zachowuje się tak, jak wszystkie inne urządzenia Bluetooth. Należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa określonych przez linię lotniczą.

**Ostrzeżenie:** NIE NALEŻY używać uszkodzonego lub pękniętego inteligentnego nadajnika, ponieważ mogłoby to stworzyć niebezpieczeństwo elektryczne lub awarię oraz prowadzić do porażenia prądem.

**Przestroga:** przed rozpoczęciem ładowania baterii nadajnik należy zawsze zdjąć z ramienia.

## Mocowanie inteligentnego nadajnika nad wszczepionym czujnikiem

Inteligentny nadajnik należy przymocować do skóry bezpośrednio nad czujnikiem za pomocą przylepca. Przylepiec powinien być wymieniany codziennie. Przylepiec z jednej strony przylega do tylnej części inteligentnego nadajnika, natomiast druga przylepna warstwa z silikonu przylega do skóry. Aby zapewnić dobrą przylepność przylepca, obie powierzchnie, skóra oraz powierzchnia nadajnika, powinny być suche i czyste.

**Uwaga:** Pracownik służby zdrowia przekaze pacjentowi przylepce.


**Uwaga:** W przypadku obaw dotyczących reakcji alergicznej na silikon, przed zastosowaniem należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Po 24 godzinach użytkowania przylepiec należy wyrzucić.

1. Zdejmij spodnią warstwę papieru z obrysem inteligentnego nadajnika. Postaraj się nie dotykać klejącej środkowej części przylepca.




2. Ustaw inteligentny nadajnik nad klejącą (środkową) częścią przylepca i przyciśnij mocno, aby go przymocować.

- Inteligentny nadajnik należy umieścić tak, aby „skrzydełka” przylepca były po jego bokach (jak na ilustracji).

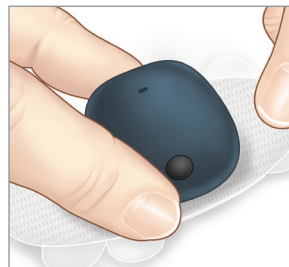

### 3. Usuń przezroczystą spodnią część i umieść inteligentny nadajnik na ramieniu bezpośrednio nad czujnikiem.

- W celu uzyskania optymalnej siły sygnału nadajnik należy umieścić bezpośrednio nad czujnikiem. Siłę sygnału można też poprawić, odpowiednio dopasowując pozycję nadajnika nad czujnikiem.

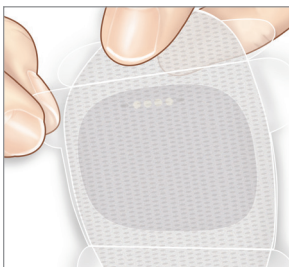


### 4. Sprawdź połączenie między inteligentnym nadajnikiem i czujnikiem.

- W aplikacji Eversense XL wybierz opcję **Menu > Przewodnik umieszczania**.
- Należy użyć **Przewodnika umieszczania**, aby prawidłowo umieścić inteligentny nadajnik i upewnić się, że czujnik i inteligentny nadajnik są połączone.




**5. Dociśnij przylepiec mocno do powierzchni skóry nad czujnikiem.**

- Inteligentny nadajnik należy ustawić tak, aby skrzydełka przylepca były ułożone poziomo na ramieniu.

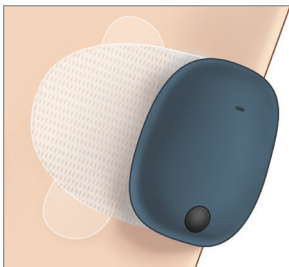

**6. Ciągąc za końcówkę, usuń pozostałości przezroczystej warstwy spodniej.**

- Wygładź przylepiec na skórze. Upewnij się, że przylepiec leży płasko na skórze.

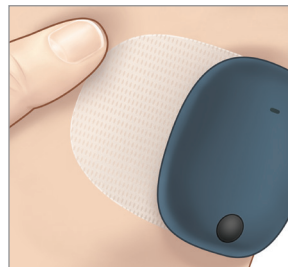

## Włączanie i wyłączanie inteligentnego nadajnika

Inteligentny nadajnik jest wyposażony w przycisk zasilania, służący do jego włączania i wyłączania. Dodatkowo posiada dwie kontrolki (LED), wskazujące poziom naładowania baterii nadajnika.

5

### 1. Aby włączyć inteligentny nadajnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około pięć sekund.

- Inteligentny nadajnik zawibruje jednokrotnie.
- Zwolnij przycisk zasilania. Kontrolka mignie, wskazując, że zasilanie zostało włączone.

W dowolnej chwili naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania w celu sprawdzenia, czy nadajnik jest włączony. Jeżeli kontrolka LED zaświeci się, oznacza to, że inteligentny nadajnik jest włączony. Jeżeli kontrolka LED nie zaświeci się, oznacza to, że inteligentny nadajnik jest wyłączony.



### 2. Aby wyłączyć inteligentny nadajnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około pięć sekund.

- Inteligentny nadajnik zawibruje jednokrotnie.
- Zwolnij przycisk zasilania. Pomarańczowa kontrolka LED mignie, wskazując, że zasilanie zostało wyłączone.

## Obsługa i konserwacja inteligentnego nadajnika

- Nadajnik i stację dokującą należy utrzymywać w czystości (bez widocznych zabrudzeń) i zabezpieczyć, kiedy nie są użytkowane. Przed kolejnym użyciu urządzenie należy wytrzeć do czysta ściereczką.
- W momencie sygnalizacji niskiego poziomu naładowania baterii należy podłączyć nadajnik do ładowarki.
- Baterię inteligentnego nadajnika należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza. Używanie zasilacza innego niż dołączony przez firmę Senseonics może skutkować unieważnieniem gwarancji. **NIE WOLNO** używać uszkodzonego zasilacza.

Inteligentny nadajnik należy czyścić przy użyciu ściereczki zwilżonej wodą. Ściereczkę należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Inteligentny nadajnik i wszystkie jego komponenty należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Poziom naładowania baterii inteligentnego nadajnika można sprawdzić w aplikacji lub nadajniku.

### W aplikacji:

- Wybierz kolejno opcje **Menu > Informacje > Mój nadajnik**. Przewiń ekran w dół, do wiersza Poziom baterii, który wskazuje ilość energii pozostałą w baterii.

*Lub*

- Sprawdź ikonę baterii w prawym górnym rogu ekranu **MOJA GLUKOZA**. Czerwona ikona baterii wskazuje, że poziom naładowania jest niski.

### Na inteligentnym nadajniku:

- Przy włączonym nadajniku wciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Jeżeli poziom naładowania baterii wynosi przynajmniej 10%, kontrolka LED mignie na zielono. Baterię inteligentnego nadajnika należy zawsze ładować pełne 15 minut, aż do całkowitego naładowania, podłączając ją do gniazda ściennego. Więcej informacji o kontrolkach LED zamieszczono na następnej stronie.

## Kontrolki LED stanu

Inteligentny nadajnik informuje o stanie poprzez kolory kontrolki LED.

### • Podczas korzystania z inteligentnego nadajnika:

Kontrolka LED stanu	Stan	Działanie
Po wciśnięciu przycisku zasilania kontrolka LED będzie świecić się na zmianę na zielono i czerwono, 3 razy w ciągu 5 sekund	Tryb „Widoczny”	Sparuj inteligentny nadajnik z urządzeniem przenośnym
Po wciśnięciu przycisku kontrolka nie miga	Inteligentny nadajnik jest wyłączony	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby wyłączyć nadajnik.
Po wciśnięciu przycisku zasilania kontrolka mignie na zielono	Poziom naładowania baterii wynosi 10–90%	Nie jest wymagane żadne działanie
Po wciśnięciu przycisku zasilania kontrolka mignie na pomarańczowo	Niski poziom naładowania baterii, pozostało mniej niż 10%	Naładuj baterię
Kontrolka LED świeci się na pomarańczowo przez 1 minutę	Wysłano alert	Sprawdź aplikację na swoim urządzeniu przenośnym, aby odczytać alert

### • Podczas ładowania inteligentnego nadajnika:

Kontrolka LED stanu	Stan baterii	Działanie
Stałe lub migające światło pomarańczowe po podłączeniu kabla USB	Poziom naładowania 0–65%	Przed odłączeniem od źródła zasilania należy ładować przez 15 minut
Stałe światło zielone po podłączeniu kabla USB	Poziom naładowania 65–100%	Przed odłączeniem od źródła zasilania należy ładować przez 15 minut



## 6. Kalibrowanie systemu

*Niniejszy rozdział opisuje procedurę i harmonogram kalibracji systemu Eversense XL CGM.*

W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności systemu należy go regularnie kalibrować. Kalibracja systemu odbywa się przy użyciu odczytów z glukometru na podstawie próbki krwi z opuszka palca. **NIE WOLNO** pobierać krwi do badania glukometrem z innych miejsc, np. z ramienia. Do kalibracji można używać każdego dostępnego glukometru. Po wszczęciu czujnika i powiązaniu go z inteligentnym nadajnikiem rozpocznie się 24-godzinna faza nagrzewania systemu. Podczas trwania tej fazy wykonywanie kalibracji nie jest wymagane.

6

Proces kalibracji składa się z dwóch faz:

**Faza inicjalizacji** — po zakończeniu 24-godzinnej fazy nagrzewania należy wykonać kalibrację na podstawie 4 badań próbek krwi z palca, w odstępie od 2 do 12 godzin.

**Faza dziennej kalibracji** — po zakończeniu fazy inicjalizacji należy codziennie wykonywać kalibrację. Dzienna kalibracja oznacza dwa badania próbek krwi z opuszka palca, w odstępie od 10 do 14 godzin.

Wykonywanie dziennej kalibracji jest bardzo ważne dla zapewnienia jak najlepszej wydajności systemu Eversense XL CGM. Poniższe wskazówki pomogą w usprawnieniu pomiarów kalibracyjnych:

**Wskazówki dotyczące zapewnienia prawidłowości kalibracji:**

- ✓ Kalibrację należy wykonywać w godzinach, w których poziom glukozy nie zmienia się gwałtownie (np. przed posiłkami, przed podaniem insuliny).
- ✓ Po rozpoczęciu kalibracji nie wolno zdejmować inteligentnego nadajnika przez kolejne 15 minut.
- ✓ Przed wykonaniem pomiaru zawartości glukozy we krwi należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i dokładnie je wytrzeć. Wykonanie tych czynności jest bardzo ważne przed przystąpieniem do kalibracji.
- ✓ Aby zapewnić dokładność pomiaru zawartości glukozy we krwi, należy zawsze stosować się do zaleceń producenta glukometru.
- ✓ Upewnić się, że kod na pasku testowym fiolki odpowiada kodowi na glukometrze (jeżeli kodowanie jest wymagane).

**Kalibracja *NIE* zostanie ukończona lub wyniki *NIE* zostaną uznane w następujących sytuacjach:**

- ✗ Wartość wskazywana przez glukometr jest mniejsza niż 40 mg/dL.
- ✗ Wartość wskazywana przez glukometr jest większa niż 400 mg/dL.
- ✗ Pomiar poziomu glukozy we krwi został wykonany więcej niż 10 minut przed wprowadzeniem wyników do aplikacji Eversense XL.
- ✗ Wskazanie czujnika różni się znacznie od wskazania glukometru.
- ✗ Bateria inteligentnego nadajnika była ładowana w ciągu 15 minut od wprowadzenia wartości kalibracji.

## Fazy kalibracji

### A. Faza inicjalizacji (po upływie 24-godzinnej fazy nagrzewania)

Faza wymaga przeprowadzenia 4 testów próbek krwi pobranych z opuszka palca.

- Należy wykonać 4 pomiary kalibracyjne w odstępie od 2 do 12 godzin. Przy czym wszystkie 4 muszą być wykonane w ciągu 36 godzin.
  - 1. kalibracja = 24 godziny po wszczęciu czujnika.
  - 2. kalibracja = od 2 do 12 godzin po 1. pomyślnej kalibracji.
  - 3. kalibracja = od 2 do 12 godzin po 2. pomyślnej kalibracji.
  - 4. kalibracja = od 2 do 12 godzin po 3. pomyślnej kalibracji.
- Zmierzona wartość glukozy zostanie wyświetlona w aplikacji po kilku minutach od pomyślnego zakończenia 2. kalibracji.

**WAŻNE:** jeżeli inteligentny nadajnik nie jest włączony, sparowany z aplikacją Eversense i połączony z czujnikiem, system nie przypomni użytkownikowi systemu o kalibracji.

### Ponowne przejście do fazy inicjalizacji

Poniższe sytuacje spowodują ponowne przejście systemu do fazy inicjalizacji:

- Nieukończenie testu kalibracyjnego w fazie inicjalizacji w ciągu 12 godzin.
- Nieukończenie wszystkich 4 testów kalibracyjnych w fazie inicjalizacji w ciągu 36 godzin.
- Nieukończenie 2 testów kalibracyjnych w fazie dziennej kalibracji w ciągu 24 godzin (zob. *B. Faza dziennej kalibracji*).
- Znaczna różnica między wynikami ostatnich kilku pomiarów poziomu glukozy i wynikiem pokazywanym przez czujnik.
- Bateria inteligentnego nadajnika pozostawała nienaładowana przez ponad 16 godzin.
- Po otrzymaniu alertu kontroli czujnika.
- 6 godzin po otrzymaniu alertu wstrzymania czujnika.

## B. Faza dziennej kalibracji

Faza dziennej kalibracji wymaga wykonania 2 testów przy użyciu glukometru, rano i wieczorem. Pierwsza faza dziennej kalibracji rozpocznie się po pomyślnym zakończeniu fazy inicjalizacji.

- System automatycznie poinformuje użytkownika systemu o odpowiedniej godzinie przeprowadzenia każdej z dwóch dziennych kalibracji.
- Godziny dziennych kalibracji należy wybrać tak, aby odstęp czasu wynosił od 10 do 14 godzin.
- System umożliwia wykonanie testów kalibracyjnych maksymalnie na 2 godziny **przed** zaplanowanym czasem. W przypadku pominięcia zaplanowanej godziny kalibracji system będzie o niej przypominał co godzinę.
- Kolejną dopuszczalną godzinę wykonania kalibracji pokazuje ekran **KALIBRACJA**.

**Uwaga:** w przypadku pominięcia testu dziennej kalibracji po upływie 16 godzin od uzyskania ostatniego akceptowalnego wyniku kalibracji nie będą wyświetlane żadne nowe wskazania systemu Eversense XL CGM. Jeżeli wynik testu kalibracyjnego nie zostanie wprowadzony w ciągu 24 godzin od uzyskania ostatniej zaakceptowanej kalibracji, system przejdzie ponownie do fazy inicjalizacji.

## Metoda kalibracji

**Ostrzeżenie:** system należy zawsze kalibrować przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszka palca. Do kalibracji systemu **NIE NALEŻY** stosować, odczytów poziomu glukozy z krwi pobranej z innych miejsc (np. z przedramienia lub dłoni).

### Uwaga:

- W przypadku dziennej kalibracji system Eversense XL CGM będzie wysyłał użytkownikowi alerty, przypominające o zaplanowanych godzinach wykonywania kalibracji.
- Użytkownik może zmienić godziny kalibracji, aby lepiej je dopasować do swojego harmonogramu. W aplikacji należy wybrać opcje **Menu > Ustawienia > Dzienna kalibracja**.
- Kalibrację można przeprowadzić maksymalnie na 2 godziny przed zaplanowaną godziną kalibracji. W przypadku pominięcia zaplanowanej godziny kalibracji system będzie przypominał o niej co godzinę.
- Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych kalibracji. Każda dodatkowa kalibracja może być wykonana w odstępie co najmniej jednej godziny. Aby wykonać dodatkową kalibrację w aplikacji, wybierz opcje **Menu > Kalibruj**.
- Jeżeli wybrana godzina nie mieści się w ramach czasowych określonych dla kalibracji, ekran **KALIBRUJ** poinformuje, że nie nadszedł jeszcze czas wykonania kalibracji.


## 1. W momencie nadejścia zaplanowanej godziny kalibracji, aplikacja wyświetli ekran **KALIBRUJ TERAZ**.

- Wybierz opcję **Kalibruj**.
- Pojawi się ekran **KALIBRUJ**.
- Jeżeli chcesz przeprowadzić kalibrację później, wybierz opcję **Nie teraz**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
<b>Kalibruj</b>	Zatwierdź
Wpisz godzinę oraz wartość poziomu glukozy we krwi odczytaną z glukometru, wybierz „Zatwierdź” aby wprowadzić.	
Godzina	11:13 >
Glukoza	----- >
Notatki >	
Godzina następnej zaplanowanej kalibracji	
Dzisiaj między 16:00 i 19:00	
Dni od wprowadzenia: 14	
> Wskazówki dotyczące kalibracji	

POWIADOMIENIE	
<b>Kalibruj teraz</b>	
czwartek, marca 09, 10:08	
Wymagana kalibracja. Wykonaj teraz kalibrację z użyciem glukometru i próbki krwi z opuszka palca.	
<input type="button" value="Nie teraz"/>	<input type="button" value="Kalibruj"/>
T0000046	

## 2. Zrób pomiar krwi z opuszka palca za pomocą glukometru

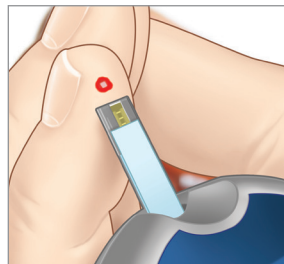

### 3. Wybierz opcję **Głukoza** i wprowadź wartość z badania poziomu glukozy na podstawie próbki krwi pobranej z opuszka palca.

- Wybierz opcję **Gotowe**.
- Wybierz opcję **Notatki**, aby wprowadzić uwagi.
- Wybierz opcję **Gotowe**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

Kalibruj

Zatwierdź

Wpisz godzinę oraz wartość poziomu glukozy we krwi odczytaną z glukometru, wybierz „Zatwierdź” aby wprowadzić.

Godzina

11:13

>

Glukoza

-----

>

Notatki

>

Godzina następnej zaplanowanej kalibracji

Dzisiaj między 16:00 i 19:00

Dni od wprowadzenia: 14

> Wskazówki dotyczące kalibracji

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

Kalibruj

Zatwierdź

Wpisz godzinę oraz wartość poziomu glukozy we krwi odczytaną z glukometru, wybierz „Zatwierdź” aby wprowadzić.

Godzina

11:13

>

Glukoza

-----

>

Anuluj

Glukoza

Gotowe

115

116

117

118

119

120

121

6

Instrukcja użytkownika systemu Eversense XL CGM

49

4. Ekran **KALIBRUJ** pokaże godzinę i wartość wprowadzonego wskazania glukometru. W przypadku stwierdzenia błędu powtórz krok 3.

- Po sprawdzeniu wpisanych danych wybierz opcję **Zatwierdź**.


5. Pojawi się ekran **KALIBRACJA ZAAKCEPTOWANA**.

- Wybierz opcję **OK**.

**Uwaga:** mogą wystąpić sytuacje, w których wynik kalibracji nie zostanie zaakceptowany. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Kalibrowanie systemu*.



6. Pojawi się ekran **MOJA GLUKOZA** z ikoną w kształcie czerwonej kropli krwi, która oznacza kalibrację.

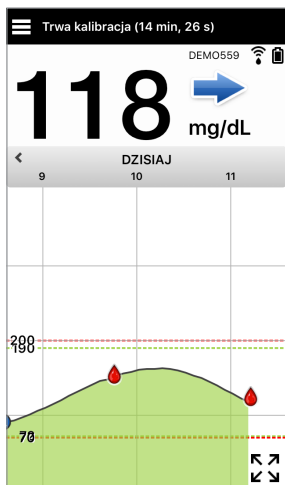

**WAŻNE:** w okresie co najmniej 5 minut przed testem i 15 minut po teście kalibracji nie należy zdejmować inteligentnego nadajnika z miejsca wszczepienia czujnika. Pasek stanu w górnej części ekranu informuje użytkownika systemu o czasie zakończeniu kalibracji.

# 7. Użytkowanie aplikacji

*Rozdział opisuje aplikację Eversense XL: ekran główny, wykres trendu, strzałki trendu, ekran menu.*

Aplikacja komunikuje się z inteligentnym nadajnikiem w celu otrzymywania i wyświetlania informacji o poziomie glukozy, trendów, wykresów i alertów. Aplikacja przechowuje także historię pomiarów poziomu glukozy w zakresie maksymalnie 90 dni.

**Uwaga:** po wylogowaniu się przez użytkownika systemu z aplikacji Eversense XL inteligentny nadajnik nie będzie wysyłał informacji o poziomie glukozy do czasu, aż użytkownik systemu ponownie zaloguje się do aplikacji.

7

Ekran **MOJA GLUKOZA** zapewnia łatwy dostęp do funkcji:

- odczytów z czujnika poziomu glukozy w czasie rzeczywistym,
- tempa i kierunku zmian poziomów glukozy,
- wykresów trendów poziomów glukozy,
- alertów (dotyczących hipoglikemii lub hiperglikemii),
- zdarzeń, takich jak posiłki, ćwiczenia i przyjmowanie leków.

**Uwaga:** do pobrania lub/i aktualizacji aplikacji Eversense XL wymagane jest bezprzewodowe połączenie z Internetem.

## Sprawdzanie ustawień urządzenia przenośnego

Do używania systemu Eversense XL CGM wymagane jest urządzenie przenośne. Aby dane stężenia glukozy były prawidłowo wyświetlane w aplikacji, należy prawidłowo skonfigurować urządzenie przenośne. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia przenośnego, aby skonfigurować następujące ustawienia:

- godzina i data;
- włączenie komunikacji Bluetooth (aktywacja);
- włączenie odbierania powiadomień;
- poziom naładowania baterii;
- strefa geograficzna;
- język;
- dźwięk w urządzeniu przenośnym musi być włączony, nie powinien być ustawiony na wibracje;
- Tryb „Nie przeszkadzać” powinien być wyłączony. Niektóre aplikacje i ustawienia, takie jak tryb jazdy mogą automatycznie włączać tryb „Nie przeszkadzać”. Więcej informacji znajduje się w instrukcjach urządzenia mobilnego.

**Jeśli w urządzeniu przenośnym zostanie ustawiony tryb „Nie przeszkadzać”, powiadomienia z aplikacji Eversense XL nie będą odtwarzane.**

## Zarządzanie kontem w aplikacji Eversense

Ze względów bezpieczeństwa, jeśli użytkownik trzy razy z rzędu wprowadzi nieprawidłowe hasło w aplikacji mobilnej, konto zostanie zablokowane na 30 minut. W tym czasie dostęp do danych CGM w aplikacji mobilnej nie będzie możliwy.

### Nieprawidłowe hasło

Wprowadzono niepoprawne hasło 1 razy. Pozostało Ci jeszcze 2 prób, zanim Twoje hasło zostanie czasowo zablokowane.

OK

### Konto zablokowane na 30 minut.

Wprowadzono niepoprawne hasło 3 razy. Dla bezpieczeństwa Twoje hasło zostało czasowo zablokowane. Spróbuj ponownie o 11:17 AM.

OK

**Przestroga:** jeśli użytkownik nie może uzyskać dostępu do danych CGM, powinien monitorować stężenie glukozy za pomocą domowego urządzenia do monitorowania poziomu glukozy we krwi.

Aplikacja mobilna Eversense będzie okresowo sprawdzać, czy dane do logowania nie zostały zmienione za pośrednictwem konta Eversense DMS.

Jeśli użytkownik zmieni hasło do konta Eversense na ekranie logowania DMS lub na stronie zmiany hasła DMS, konieczne jest wylogowanie się z aplikacji mobilnej Eversense i ponowne zalogowanie przy użyciu nowego hasła.

Jeśli hasła są niezgodne, aplikacja mobilna Eversense wyświetli powiadomienie o niedostępności niektórych funkcji, w tym o braku możliwości synchronizacji danych z kontem DMS, braku możliwości dodawania użytkowników Eversense NOW do kręgu użytkowników oraz braku możliwości zmiany zdjęcia profilowego.

Jeśli użytkownik trzykrotnie wprowadzi nieprawidłowe hasło na stronie logowania DMS, niektóre funkcje aplikacji mobilnej mogą być niedostępne przez 30 minut, w tym niemożliwa będzie synchronizacja danych z kontem DMS, dodawanie użytkowników Eversense NOW do kręgu użytkowników i zmiana zdjęcia profilowego. W tym czasie nie należy wylogowywać się z aplikacji mobilnej.

### ALERT

#### Wykryto nowe hasło poniedziałek, kwietnia 25, 19:46

Wykryto nowe hasło do Twojego konta DMS. Aby kontynuować, wyloguj się z aplikacji i zaloguj się ponownie. Jeśli to niczego nie zmieni, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

OK

DEMO4527

### Wykryto nowe hasło

Wykryto nowe hasło do Twojego konta DMS. Aby kontynuować, wyloguj się z aplikacji i zaloguj się ponownie. Jeśli to niczego nie zmieni, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

OK

### Konto zablokowane na 30 minut.

Nieprawidłowe hasło wprowadzono 3 razy. Ta funkcja jest czasowo niedostępna. Spróbuj ponownie za 30 minut. NIE można wylogować się z aplikacji mobilnej przez 30 minut.

OK

## Ekran „Moja Glukoza”

Ekran **MOJA GLUKOZA** to główny ekran aplikacji. Przedstawia szereg danych, takich jak: odczyty poziomów, glukozy, kierunek i tempo zmian strzałki trendu, wykres trendu, zdarzenia, kalibracje i alerty oraz powiadomienia.



## Uwaga:






- Jeżeli czujnik nie jest połączony z inteligentnym nadajnikiem, pojawi się ikona połączenia inteligentnego nadajnika z czujnikiem, mająca postać czerwonej kropli krwi ze znakiem X.
- W systemie iOS można dodać widżet aplikacji Eversense XL, pokazujący ekran początkowy aplikacji Eversense XL, do ekranu widżetów. Informacje dotyczące zarządzania widżetami w systemie iOS można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego z tym systemem.
- Ekran **MOJA GLUKOZA** można oglądać także w poziomie, uzyskując dostęp do przycisków skrótów, które umożliwiają podgląd danych za ostatnie 7, 14, 30 lub 90 dni. Dane te można przesłać na swój adres e-mail jednym dotknięciem ekranu.

<b>Pasek stanu</b>	Informuje o bieżącym stężeniu glukozy we krwi i stanie systemu.
<b>Identyfikator inteligentnego nadajnika</b>	Jest to obecnie używany inteligentny nadajnik. Można zmienić jego nazwę, wybierając opcję <b>Ustawienia &gt; System</b> .
<b>Bieżące wskazanie poziomu glukozy</b>	Bieżąca zawartość glukozy we krwi, podawana w czasie rzeczywistym. Wskazanie jest aktualizowane co 5 minut.
<b>Data i godzina</b>	Bieżąca data i godzina. Można przewinąć ekran w lewo lub w prawo w celu sprawdzenia danych dla różnych dni i godzin.
<b>Poziom naładowania baterii Inteligentnego nadajnika</b>	Wskazuje ilość energii pozostałą w baterii inteligentnego nadajnika.
<b>Połączenie inteligentnego nadajnika z czujnikiem</b>	Wskazuje siłę sygnału połączenia inteligentnego nadajnika z czujnikiem.
<b>Strzałka trendu</b>	Pokazuje kierunek zmiany poziomu glukozy.
<b>Jednostka miary</b>	Jednostka miary używana podczas wyświetlania wszystkich danych poziomu glukozy.

<b>Wartości <i>alertu</i> niskiego i wysokiego stężenia glukozy</b>	Wartości graniczne alertu wysokiego i niskiego stężenia glukozy.		
<b>Wartości <i>docelowego</i> niskiego i wysokiego stężenia glukozy</b>	Wartości graniczne wysokiego i niskiego docelowego stężenia glukozy (zakres docelowy).		
<b>Symbol wielu zdarzeń</b>	Wskazuje na wystąpienie wielu zdarzeń w jednym czasie.		
<b>Symbol zdarzenia</b>	Wskazuje ręcznie wprowadzone zdarzenia (np. ćwiczenie). Więcej informacji zamieszczono w rozdziale <i>Rejestrowanie zdarzeń</i> .		
<b>Symbol kalibracji</b>	Wskazuje wpis kalibracyjny poziomu glukozy.		
<b>Wykres trendu poziomu glukozy</b>	Wskazuje rozkład poziomu glukozy w czasie. Stronę można przewijać do przodu i do tyłu lub powiększać ją w celu wyświetlenia danych w zakresie od 3 godzin do 3 dni.		
<b>Menu</b>	Zapewnia łatwe przechodzenie między różnymi sekcjami aplikacji Eversense XL: <div><div>Moja glukoza Kalibruj Historia alertów Dziennik zdarzeń</div><div>Raporty Udostępnij moje dane Przewodnik umieszczania Połącz</div><div>Ustawienia Informacje</div></div>		

## Strzałki trendu

Istnieje 5 różnych strzałek trendu, które przedstawiają bieżący kierunek zmian poziomu glukozy oraz tempo tych zmian.

	Poziomy glukozy rosną lub spadają z prędkością od 0,0 mg/dL do 1,0 mg/dL na minutę.
	Poziomy glukozy rosną umiarkowanie z prędkością od 1,0 mg/dL do 2,0 mg/dL na minutę.
	Poziomy glukozy spadają umiarkowanie z prędkością od 1,0 mg/dL do 2,0 mg/dL na minutę.
	Poziomy glukozy rosną szybko z prędkością ponad 2,0 mg/dL na minutę.
	Poziomy glukozy spadają szybko z prędkością ponad 2,0 mg/dL na minutę.

7

Do obliczania trendów aplikacja wykorzystuje **ostatnie 20 minut danych z pomiaru ciągłego**.

W przypadku braku wystarczającej liczby wartości wskazań czujnika do obliczeń strzałka jest wyświetlana w kolorze szarym.




## Wykres trendu

Wykres trendu służy do wyświetlania i analizowania danych historycznych oraz trendów wartości stężenia glukozy w czasie. Wyświetla również symbole dotyczące zdarzeń zarejestrowanych w aplikacji ręcznie (np. testy kalibracyjne i ćwiczenie).

Wykresu trendu można użyć na kilka sposobów:

- Do szybkiego przeglądania bieżącego stanu poziomu glukozy w stosunku do ustawionych poziomów alertów i docelowych. Czerwone linie przerywane pokazują alerty wysokiego i niskiego stężenia glukozy, a zielone linie przerywane pokazują wartości docelowe wysokiego i niskiego stężenia glukozy.
- Obszary cieniowane wykresu są oznaczone kolorami, w zależności od wprowadzonego ustawienia glukozy:
  - Wartości glukozy **przekraczające poziomy alertu** - kolor czerwony.
  - Wartości glukozy **w granicach poziomów docelowych** - kolor zielony.
  - Wartości glukozy **między poziomami docelowymi i poziomami alertów** - kolor żółty.
- Wybierz i przytrzymaj dowolny punkt czasowy linii wykresu, aby zobaczyć odpowiadające mu wskazanie stężenia glukozy.
- Wybierz dowolny znak na ekranie aplikacji aby uzyskać więcej informacji o danym zdarzeniu lub alercie.
- Można przybliżyć lub oddalić ekran gestami, aby zmienić zakres wyświetlanych dni/godzin wykresu trendu. Można powiększyć lub zmniejszyć ekran, aby zmienić zakres wyświetlanych danych od 3 godzin do 3 dni.
- Aby zobaczyć dane wykresu trendu dla innej daty lub godziny, należy wybrać datę na ekranie i wprowadzić żądaną datę.
- Można przeglądać wykres trendu w pionie i w poziomie. W poziomie dostępne są skróty do widoku danych za ostatnie 7, 14, 30 lub 90 dni.



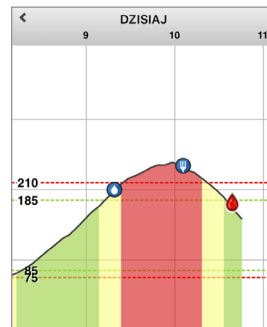



**Uwaga:** wszystkie dane dotyczące poziomu glukozy będą przechowywane w aplikacji, w dostępnej pamięci urządzenia przenośnego.









## Opcje menu

Ikona Menu (☰) pojawia się w lewym górnym rogu wszystkich ekranów aplikacji i ułatwia przechodzenie między jej funkcjami. Dostępne opcje menu:

Opcje menu	Opis
 <b>Moja glukoza</b>	Ekran główny aplikacji, który pokazuje bieżący odczyt CGM, kierunek i tempo zmian, wykres trendu, zdarzenia i alerty.
 <b>Kalibruj</b>	Umożliwia wprowadzenie wartości testów kalibracyjnych. Ekran <b>KALIBRUJ</b> pojawi się automatycznie w chwili, gdy będzie wymagana kalibracja. Ekran ten umożliwia również dodawanie dodatkowych wartości kalibracji.
 <b>Historia alertów</b>	Umożliwia przeglądanie historycznych alertów i powiadomień. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale <i>Opisy alertów</i> .
 <b>Dziennik zdarzeń</b>	Umożliwia wprowadzenie informacji o zdarzeniach takich jak: pomiary stężenia glukozy, posiłki, podanie insuliny, stan zdrowia i ćwiczenie. Więcej informacji znajduje się w rozdziale <i>Dziennik zdarzeń</i> .
 <b>Raporty</b>	Umożliwia przeglądanie raportów wygenerowanych na podstawie danych CGM. Więcej informacji znajduje się w rozdziale <i>Raporty glukozy i ich udostępnianie</i> .
 <b>Udostępnij moje dane</b>	Pozwól innym na wyświetlanie Twoich danych glukozy w aplikacji Eversense NOW.


Opcje menu	Opis
 <b>Przewodnik umieszczania</b>	Umożliwia sprawdzenie łączności między inteligentnym nadajnikiem i czujnikiem. Ekran ten używany jest podczas mocowania inteligentnego nadajnika nad czujnikiem w celu zapewnienia jego prawidłowego umieszczenia.
 <b>Połącz</b>	Umożliwia sprawdzenie połączenia między inteligentnym nadajnikiem i urządzeniem przenośnym. Połączenie Bluetooth jest wymagane do przesyłania danych do aplikacji mobilnej.
 <b>Ustawienia</b>	Umożliwia dostosowanie ustawień, takich jak wartości docelowe i poziomy alertów poziomów glukozy, dźwięki, profil tymczasowy i przypomnienia o godzinie kalibracji. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „ <i>Dostosowywanie ustawień.</i> ”
 <b>Informacje</b>	Umożliwia wyświetlenie informacji o systemie CGM, łącznie z numerami identyfikacyjnymi czujnika i inteligentnego nadajnika.

## Zdjęcie profilowe

Możesz dodać lub zmienić zdjęcie profilowe na koncie Eversense XL. Zdjęcie będzie wyświetlane w aplikacji mobilnej Eversense XL CGM i na Twoim koncie Eversense DMS.

- Przejdź do pozycji **Menu główne** i dotknij ilustracji z sylwetką.
- Postępuj zgodnie z instrukcją w celu zrobienia nowego zdjęcia lub wybierz zdjęcie zapisane na Twoim urządzeniu.
- Wybrane zdjęcie będzie wyświetlane na ekranie **Menu główne**.

**Uwaga:** zdjęcie profilowe można również zmienić z poziomu konta Eversense DMS. Więcej informacji znajduje się w Przewodniku użytkownika systemu Eversense DMS.

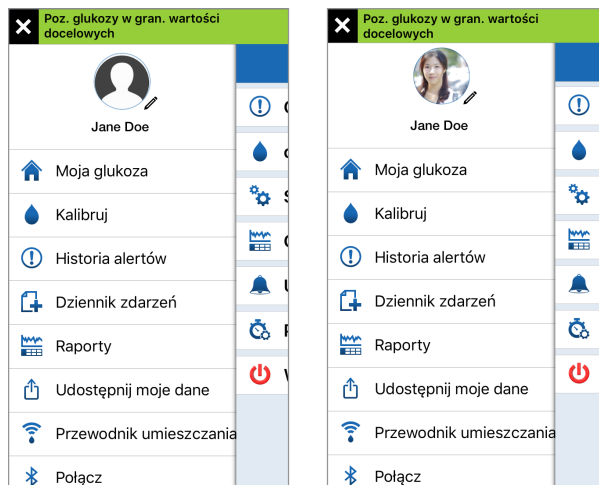

## 8. Ustawienia systemu

*Rozdział opisuje sposób personalizowania ustawień systemu Eversense XL CGM.*

Obszary dostosowywania ustawień:

- **Glukoza** — poziomy glukozy oraz tempo ich zmian, skutkujące wysłaniem alertu.
- **Dzienna kalibracja** — przypomnienia o kalibracji porannej i wieczornej.
- **System** — identyfikuje lub pozwala wprowadzać spersonalizowane informacje dotyczące użytkownika systemu.
- **Godziny posiłków** — godziny posiłków pomagające w określeniu wpływu posiłków na odczyty w raportach poziomu glukozy.
- **Ustawienia dźwięku** — pozwalają zmienić dźwięk określonych alertów poziomu glukozy, ustawić częstotliwość powtarzania alertów oraz tryb Nie przeszkadzać w aplikacji Eversense XL.
- **Profil tymczasowy** — służy do ustawienia tymczasowego profilu poziomu glukozy.
- **Wyloguj** — wylogowanie z konta Eversense XL.

### Poziomy glukozy

System Eversense XL CGM umożliwia przysyłanie alertów do inteligentnego nadajnika i urządzenia przenośnego po przekroczeniu ustawionych poziomów alertów poziomu glukozy. Użytkownik systemu wprowadza ustawienia poziomów alertów oraz wartości docelowych oraz tempo zmian poziomu glukozy na podstawie danych ustalonych z lekarzem prowadzącym.

## Ostrzeżenie:

- Przed podjęciem decyzji dotyczącej dawkowania insuliny należy wykonać kalibrację, badając poziom glukozy we krwi za pomocą glukometru.
- Alerty wysokiego i niskiego stężenia glukozy mają pomóc użytkownikowi systemu w kontrolowaniu cukrzycy i nie powinny być używane wyłącznie do wykrywania hiperglikemii bądź hipoglikemii. Interpretacja alertów zawsze powinna odbywać się w powiązaniu z pozostałymi danymi związanymi z: poziomem glukozy, trendem, wykresem liniowym, itp.

## WAŻNE:

- **Wartości alertów wysokiego i niskiego stężenia glukozy są inne od niskich i wysokich wartości docelowych.**
  - Wartości alertów niskiego i wysokiego poziomu glukozy są wyświetlane na urządzeniu przenośnym i inteligentnym nadajniku po przekroczeniu określonej wartości: niskiej lub wysokiej.
  - Wartości docelowe poziomu glukozy są wykorzystywane w raportach i wykresach liniowych. Wskazują stan glukozy w porównaniu ze stanem docelowym. Po osiągnięciu poziomów docelowych poziomu glukozy użytkownik nie otrzymuje żadnych alertów.

## Ustawianie poziomów docelowych poziomu glukozy

Wartości docelowe poziomu glukozy to niskie i wysokie wartości progowe zakresu wskazanego dla użytkownika systemu. Ustawienia te wykorzystywane są przez aplikację do wskazania, czy zmierzone wartości poziomu glukozy mieszczą się w zakresie wartości docelowych.

8

<b>Ustawienie domyślne</b>	Niskie: 80 mg/dL Wysokie: 140 mg/dL  Wartości poziomów docelowych ustalane są z pracownikiem służby zdrowia, tylko i wyłącznie na tej podstawie pacjent może wprowadzić odpowiednie dane.
<b>Ustawienie dopuszczalne</b>	Niskie: 65–120 mg/dL Wysokie: 120–345 mg/dL
<b>Włączanie/wyłączanie ustawienia</b>	Zawsze włączone (nie można go wyłączyć)
<b>Uwagi</b>	Używane w wykresach i tabelach aplikacji w celu przedstawienia czasu, przez jaki poziom glukozy mieścił się w zakresie docelowym.

## 1. Wybierz opcję Menu > Ustawienia > Glukoza w celu wyświetlenia ekranu USTAWIENIA GLUKOZY.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Glukoza

**Wartości docelowe glukozy**  
Ustaw poziomy wartości stężenia glukozy w których chcesz się utrzymać

Wysoki zakres 190 mg/dL >

Niski zakres 72 mg/dL >

**Poziomy alertu wartości glukozy**  
Ustaw poziomy stężenia glukozy, po osiągnięciu których, system powinien wyświetlić Alert

Wysoki alert 200 mg/dL >

Niski Alert 70 mg/dL >

**Alerty przewidywania**  
Otrzymaj powiadomienie X minut przed przekroczeniem przez poziom glukozy z czujnika progu alertu glukozy, przy utrzymaniu się bieżącej szybkości wzrostu.

iOS

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Glukoza

**Wartości docelowe stężenia glukozy**  
Ustaw poziomy wartości stężenia glukozy w których chcesz się utrzymać.

Wysoka wartość docelowa 150 mg/dl >

Niska wartość docelowa 80 mg/dl >

**Poziomy Alertu wartości stężenia glukozy**  
Ustaw poziomy stężenia glukozy, po osiągnięciu których, system powinien wyświetlić Alert

Alert wysokiego poziomu 180 mg/dl >

Alert niskiego poziomu 65 mg/dl >

**Alerty wartości przewidywanych**  
Otrzymaj powiadomienie X minut przed przekroczeniem przez poziom glukozy z czujnika

Android

## 2. W menu Wartości docelowe poziomu glukozy wybierz opcję Wysoki zakres i wybierz odpowiedni wysoki poziom glukozy.

- Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.
- Powtórz ten krok, aby wybrać poziom **Niski zakres**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Glukoza

**Wartości docelowe glukozy**  
Ustaw poziomy wartości stężenia glukozy w których chcesz się utrzymać.

Wysoki zakres 198 mg/dL >

Niski zakres 72 mg/dL >

**Poziomy alertu wartości glukozy**  
Ustaw poziomy stężenia glukozy, po osiągnięciu których, system powinien wyświetlić Alert

Anuluj Wysoki zakres Gotowe

120

125

130

135

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Glukoza

**Wartości docelowe glukozy**  
Ustaw poziomy wartości stężenia glukozy w których chcesz się utrzymać

Wysoki zakres 198 mg/dL >

Niski zakres 72 mg/dL >

**Poziomy alertu wartości glukozy**  
Ustaw poziomy stężenia glukozy, po osiągnięciu których, system powinien wyświetlić Alert

Wysoki alert 200 mg/dL >

Niski Alert 70 mg/dL >

**Alerty przewidywania**  
Otrzymaj powiadomienie X minut przed przekroczeniem przez poziom glukozy z czujnika progu alertu glukozy, przy utrzymaniu się bieżącej szybkości wzrostu.

8

## Ustawianie poziomów alertów poziomu glukozy

System Eversense XL CGM alarmuje użytkownika o przekroczeniu ustawionych przez niego poziomów glukozy. Po osiągnięciu niskiego i wysokiego poziomu glukozy inteligentny nadajnik inteligentny, a aplikacja mobilna emituje alert dźwiękowy i wyświetla komunikat na ekranie. Należy wtedy niezwłocznie wykonać test glukometrem próbki krwi pobranej z opuszka palca w celu podjęcia decyzji dotyczącej leczenia.

8

<b>Ustawienie domyślne</b>	Niskie: 70 mg/dL Wysokie: 200 mg/dL  Wartości poziomów alertów ustalane są z pracownikiem służby zdrowia. Tylko i wyłącznie na tej podstawie użytkownik może wprowadzić odpowiednie dane. Wartość progowa alertu niskiego poziomu glukozy nie może być wyższa od wartości docelowej niskiego poziomu glukozy, zaś wartość progowa alertu wysokiego poziomu glukozy nie może być niższa od wartości docelowej wysokiego poziomu glukozy.
<b>Ustawienie dopuszczalne</b>	Niskie: 60–115 mg/dL Wysokie: 125–350 mg/dL
<b>Włączanie/wyłączanie ustawienia</b>	Zawsze włączone (nie można go wyłączyć)
<b>Uwagi</b>	Powiadomienia dźwiękowe i alerty wizualne na urządzeniu przenośnym oraz alerty wibracyjne inteligentnego nadajnika odczuwalne na ciele użytkownika systemu .



1. Wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Glukoza** w celu wyświetlenia ekranu **USTAWIENIA GLUKOZY**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Ustawienia Glukoza	
Ustaw poziomy wartości stężenia glukozy w których chcesz się utrzymać	
Wysoki zakres	190 mg/dL >
Niski zakres	72 mg/dL >
<b>Poziomy alertu wartości glukozy</b> Ustaw poziomy stężenia glukozy, po osiągnięciu których, system powinien wyświetlić Alert	
Wysoki alert	200 mg/dL >
Niski Alert	70 mg/dL >
<b>Alerty przewidywania</b> Otrzymaj powiadomienie X minut przed przekroczeniem przez poziom glukozy z czujnika prądu alertu glukozy, przy utrzymaniu się bieżącej szybkości wzrostu.	
Alerty przewidywania	<input checked="" type="checkbox"/>

2. W menu **Poziomy alertu wartości stężenia glukozy** wybierz opcję **Wysoki alert** i wybierz odpowiednią wartość graniczną alertu wysokiego poziomu glukozy.

- Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.
- Powtórz ten krok, aby wybrać wartość graniczną pozycji **Niski alert**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Ustawienia Glukoza	
Wysoki zakres	190 mg/dL >
Niski zakres	72 mg/dL >
<b>Poziomy alertu wartości glukozy</b> Ustaw poziomy stężenia glukozy, po osiągnięciu których, system powinien wyświetlić Alert	
Wysoki alert	200 mg/dL >
Anuluj	Wysoki alert Gotowe
195	
200	
205	
210	
215	
220	

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Ustawienia Glukoza	
Wysoki zakres	190 mg/dL >
Niski zakres	72 mg/dL >
<b>Poziomy alertu wartości glukozy</b> Ustaw poziomy stężenia glukozy, po osiągnięciu których, system powinien wyświetlić Alert	
Wysoki alert	200 mg/dL >
Niski Alert	70 mg/dL >
<b>Alerty przewidywania</b> Otrzymaj powiadomienie X minut przed przekroczeniem przez poziom glukozy z czujnika prądu alertu glukozy, przy utrzymaniu się bieżącej szybkości wzrostu.	
Alerty przewidywania	<input checked="" type="checkbox"/>
Minuty	20 >

## Ustawianie alertów przewidywania

Alerty przewidywania informują z wyprzedzeniem o prawdopodobnym wystąpieniu wysokiego lub niskiego poziomu glukozy w przypadku kontynuacji bieżącego trendu.

Alerty przewidywania wykorzystują wartości wysokiego i niskiego poziomu glukozy do wczesnego ostrzegania użytkownika systemu. Po upływie czasu wczesnego ostrzeżenia inteligentny nadajnik wibruje, zaś mobilna aplikacja emituje alert dźwiękowy i wyświetla komunikat na ekranie. Należy wtedy niezwłocznie wykonać test glukometrem próbki krwi pobranej z opuszka palca w celu podjęcia decyzji dotyczącej terapii.

<b>Ustawienie domyślne</b>	WYŁ.
<b>Ustawienie dopuszczalne</b>	Z wyprzedzeniem 10, 20 lub 30 minut
<b>Włączanie/wyłączanie ustawienia</b>	Można włączyć tę funkcję. Jeżeli funkcja nie zostanie włączona, alerty przewidywania nie będą generowane. Wartość domyślna to 20 minut.
<b>Uwagi</b>	Powiadomienia dźwiękowe i alerty wizualne na urządzeniu przenośnym oraz alerty wibracyjne inteligentnego nadajnika odczuwalne na ciele użytkownika systemu.

1. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Glukoza** w celu wyświetlenia ekranu **USTAWIENIA GLUKOZY**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Glukoza

Niski Alert 70 mg/dL >

**Alerty przewidywania**  
Otrzymaj powiadomienie X minut przed przekroczeniem przez poziom glukozy z czujnika progu alertu glukozy, przy utrzymaniu się bieżącej szybkości wzrostu.

Alerty przewidywania ☐

Minuty nd. >

**Alerty szybkości**  
Otrzymaj powiadomienie, gdy poziom glukozy z czujnika ulega zmianie (wzrostu lub spadania) szybciej, niż zadana szybkość zmiany.

Alerty szybkości ☐

Szybkość zmian nd. >

2. Następnie otwórz menu **Alerty przewidywania** i przesun przycisk **WYŁ.** w prawo, w położenie **WŁ.**
3. Wybierz opcję **Minuty**, aby ustawić, ile minut wcześniej ma być wysyłane ostrzeżenie.
  - Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Glukoza

**Alerty przewidywania**  
Otrzymaj powiadomienie X minut przed przekroczeniem przez poziom glukozy z czujnika progu alertu glukozy, przy utrzymaniu się bieżącej szybkości wzrostu.

Alerty przewidywania ☒

Minuty 20 >

Anuluj Minuty Gotowe

10

20

30

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Glukoza

Niski Alert 70 mg/dL >

**Alerty przewidywania**  
Otrzymaj powiadomienie X minut przed przekroczeniem przez poziom glukozy z czujnika progu alertu glukozy, przy utrzymaniu się bieżącej szybkości wzrostu.

Alerty przewidywania ☒

Minuty 20 >

**Alerty szybkości**  
Otrzymaj powiadomienie, gdy poziom glukozy z czujnika ulega zmianie (wzrostu lub spadania) szybciej, niż zadana szybkość zmiany.

Alerty szybkości ☐


Szybkość zmian nd. >

## Ustawianie alertów o szybkości zmian



Alerty o tempie zmian informują, czy stężenie glukozy spada lub rośnie szybciej niż wynosi wartość ustawienia alertu tempa zmian.

<b>Ustawienie domyślne</b>	WYŁ.
<b>Ustawienie dopuszczalne</b>	1,5–5 mg/dL na minutę
<b>Włączanie/wyłączanie ustawienia</b>	Można włączyć tę funkcję. Jeżeli funkcja nie zostanie włączona, alerty tempa zmian nie będą generowane.
<b>Uwagi</b>	Powiadomienia dźwiękowe i alerty wizualne na urządzeniu przenośnym oraz alerty wibracyjne inteligentnego nadajnika.

1. Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Glukoza** w celu wyświetlenia ekranu **USTAWIENIA GLUKOZY**.

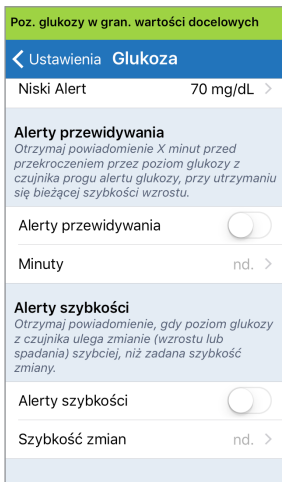


2. Następnie otwórz menu **Alerty szybkości** i przesunąć przycisk **WYŁ.** w prawo, w położenie **WŁ.**
3. Wybierz opcję **Szybkość zmian**, aby ustawić tempo zmian.
  - Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

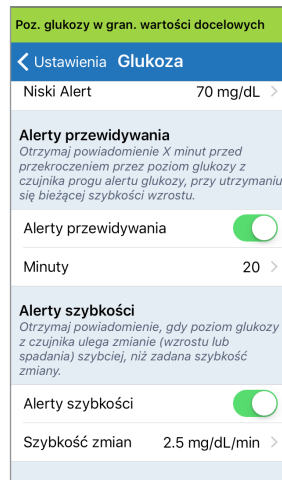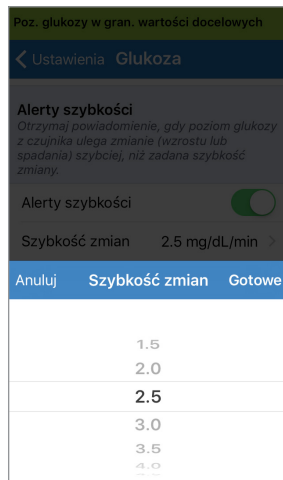

# Ustawianie godziny dziennej kalibracji

Funkcja ta pozwala na ustawienie godzin kalibracji, rano i wieczorem, w celu generowania przypomnień. Można przeprowadzić kalibrację maksymalnie na 2 godziny przed zaplanowaną godziną kalibracji. Godziny kalibracji porannej i wieczornej należy ustawić z odstępem od 10 do 14 godzin.

## 1. Wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Dzienna kalibracja**.

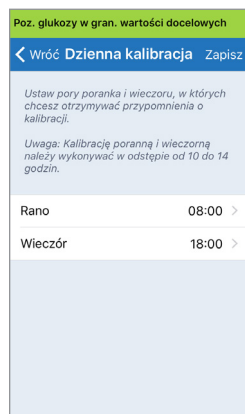


## 2. Wybierz opcję **Rano**, aby ustawić godzinę kalibracji porannej.


- Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

## 3. Wybierz opcję **Wieczór**, aby ustawić godzinę kalibracji wieczornej.

- Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

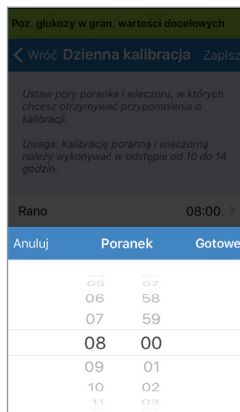


iOS

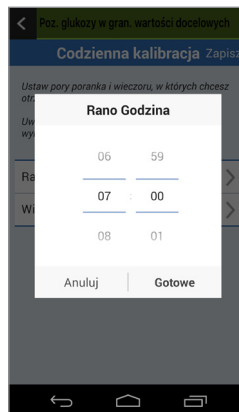

Android

## 4. Po wprowadzeniu prawidłowych godzin wybierz opcję **Zapisz**.

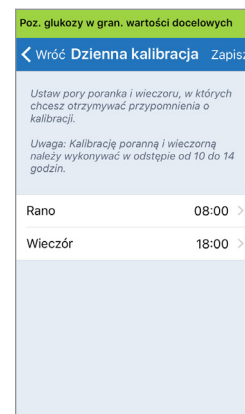

# Ustawianie informacji o systemie

Ekran **SYSTEM** pozwala na przeglądanie i edytowanie innych ustawień systemu Eversense XL CGM.

1. Wybierz opcję **Menu > Ustawienia > System** w celu wyświetlenia ekranu **SYSTEM**.

2. Na ekranie **SYSTEM** możesz wybrać dowolną z poniższych pozycji w celu ich ustawienia:

- **Jednostki stężenia.** Jednostka miary odczytów stężenia glukozy. Aby edytować to ustawienie, należy ponownie zainstalować aplikację.
- **Nazwa.** Numer seryjny inteligentnego nadajnika. Można wybrać wyświetlany numer seryjny i nadać nadajnikowi własną nazwę.
- **Połączony czujnik.** Numer seryjny czujnika połączonego z inteligentnym nadajnikiem. Można wybrać tę opcję, aby uzyskać dostęp do funkcji łączenia lub ponownego łączenia czujnika.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Ustawienia <b>System</b>	
Jednostki stężenia glukozy mg/dL	
Nazwa	DEMO559 >
Połączony czujnik	7679 >

## Ustawienia harmonogramu posiłków

Ekran **GODZINY POSIŁKÓW** pokazuje przedziały czasowe na śniadanie, lunch, obiad i sen. Odstępy czasowe ustawione na ekranie **GODZINY POSIŁKÓW** są używane w widoku wykresu raportu do wskazania wysokich, niskich i średnich wartości CGM w każdym przedziale czasu między posiłkami.

1. Wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Godziny posiłków**, aby wyświetlić ekran **GODZINY POSIŁKÓW**.
2. Wybierz kolejno każdy wymieniony posiłek, a następnie wybierz opcję **Start i Koniec**, aby ustawić odpowiednie przedziały czasowe konkretnych posiłków.


Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Ustawienia Godziny posiłków	
Przedziały czasowe do tabeli pór posiłków	
Śniadanie	06:00-10:00 >
Obiad	10:00-14:00 >
Przekąska	14:00-18:00 >
Kolacja	18:00-22:00 >
Sen	22:00-06:00 >




## Ustawianie dźwięków

Ekran **USTAWIENIA DŹWIĘKU** pokazuje ustawienia dźwiękowe alertów niskiego i wysokiego poziomu glukozy. Na tym ekranie można również ustawić częstotliwość powtarzania alertów.

1. Wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Ustawienia dźwięku** w celu wyświetlenia ekranu **USTAWIENIA DŹWIĘKU**.

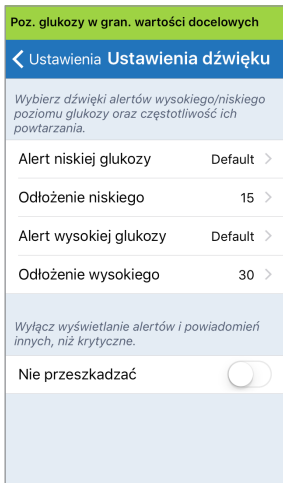


2. Wybierz każdy z alertów dla którego chcesz ustawić dźwięk. Wybierz opcję **Wstecz**, aby wrócić do ekranu **USTAWIENIA DŹWIĘKU**.

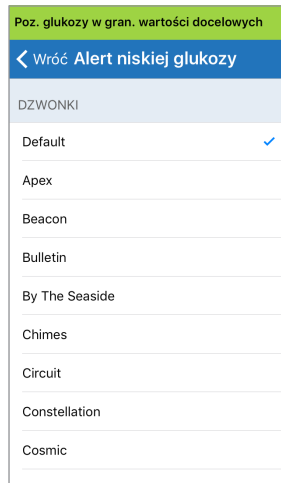

**WAŻNE:** należy się upewnić, że dźwięk w urządzeniu przenośnym jest włączony. Jeżeli dźwięk w urządzeniu przenośnym będzie wyłączony, dźwięk alertu generowanego przez aplikację nie zostanie wyemitowany.

Ustawiając częstotliwość powtarzania alertów, można wybrać częstotliwość powtarzania alertu niskiego lub wysokiego poziomu glukozy.

### 3. Wybierz każdą z opcji powtarzania alertu aby ustawić jej częstotliwość. Po zakończeniu wybierz opcję **Gotowe**.

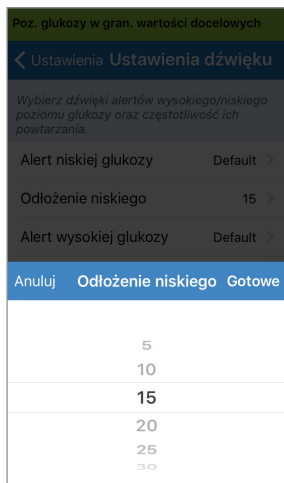

Ekran **USTAWIENIA DŹWIĘKU** umożliwia też włączenie i wyłączenie trybu „Nie przeszkadzać”.

- **Nie przeszkadzać.** Włącza tryb „Nie przeszkadzać” w aplikacji i na urządzeniu przenośnym.
- **WYŁ. — INTELIGENTNY NADAJNIK I APLIKACJA** będą wysyłały wszystkie sygnały: alerty i powiadomienia, niezależnie od ich wagi.
- **WŁ. —** Aplikacja i inteligentny nadajnik będą wysyłać tylko krytyczne alerty i powiadamiać o nich przez wibracje odczuwalne na ciele pacjenta.

**Uwaga:** po włączeniu trybu „Nie przeszkadzać” na urządzeniu przenośnym użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych alertów ani powiadomień z aplikacji Eversense XL. Wykaz alertów znajduje się w rozdziale *Opisy alertów*.

# Ustawianie profilu tymczasowego

W przypadku czynności lub warunków wykraczających poza rutynowe można ustawić wartości glukozy inne od standardowych wartości wprowadzonych do aplikacji. Ekran **PROFIL TYMCZASOWY** umożliwia wprowadzenie tymczasowych wartości docelowych oraz alertów poziomu glukozy w zadanym okresie. Po upływie czasu obowiązywania profilu tymczasowego standardowe wartości poziomu glukozy wprowadzone w menu **Ustawienia > Poziom glukozy** zostaną przywrócone automatycznie.

1. Wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Profil tymczasowy**, aby wyświetlić ekran **PROFIL TYMCZASOWY**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Ustawienia Profil tymczasowy	
Ustaw poziomy wartości stężenia glukozy przy których chcesz otrzymywać powiadomienia od systemu, gdy Twój Profil Tymczasowy jest aktywny. Naciśnij START, aby aktywować, naciśnij STOP, aby wyłączyć.	
Czas trwania	0godz. 30min >
Wysoki zakres	190 mg/dL >
Niski zakres	72 mg/dL >
Wysoki alert	200 mg/dL >
Niski Alert	70 mg/dL >
START	

2. Ustaw czas obowiązywania profilu. Czas obowiązywania profilu tymczasowego możesz ustawić na maksymalnie 36 godzin, z przyrostami co 30 minut.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Ustawienia Profil tymczasowy	
Ustaw poziomy wartości stężenia glukozy przy których chcesz otrzymywać powiadomienia od systemu, gdy Twój Profil Tymczasowy jest aktywny. Naciśnij START, aby aktywować, naciśnij STOP, aby wyłączyć.	
Czas trwania	0godz. 30min >
Wysoki zakres	190 mg/dL >
Anuluj Czas trwania Gotowe	
0godz.	
1godz.	0min
2godz.	30min
3godz.	
4godz.	

3. Ustaw żądany niski i wysoki zakres docelowy poziomu glukozy w profilu tymczasowym. Oras niską i wysoką wartość progową alertu. Wybierz opcję **START**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Profil tymczasowy

Ustaw poziomy wartości stężenia glukozy przy których chcesz otrzymywać powiadomienia od systemu, gdy Twój Profil Tymczasowy jest aktywny. Naciśnij START, aby aktywować, naciśnij STOP, aby wyłączyć.

Czas trwania 0godz. 30min >

Wysoki zakres 190 mg/dL >

Anuluj Wysoki zakres Gotowe

175
180
185
190
195

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Ustawienia Profil tymczasowy

ed systemu, gdy Twój Profil Tymczasowy jest aktywny. Naciśnij START, aby aktywować, naciśnij STOP, aby wyłączyć.

Czas trwania 0godz. 30min >

Wysoki zakres 190 mg/dL >

Niski zakres 72 mg/dL >


Anuluj Niski zakres Gotowe

75
80
85
90


W trakcie obowiązywania profilu tymczasowego tych wartości nie będzie można zmienić.

W trakcie trwania profilu tymczasowego ikona profilu jest wyświetlana na ekranie **MOJA GLUKOZA**.

Ikona profilu tymczasowego →

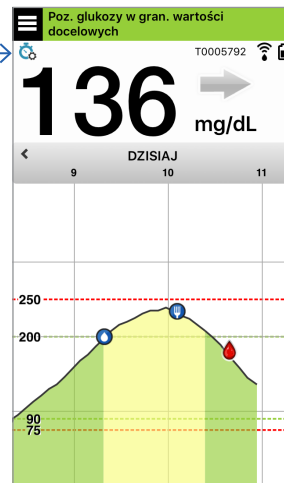

Po zakończeniu okresu obowiązywania profilu tymczasowego aplikacja wyświetli powiadomienie i przestanie wyświetlać ikonę profilu na ekranie **MOJA GLUKOZA**.

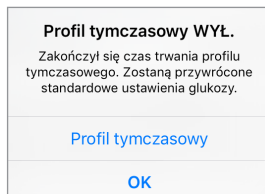

Aby zakończyć okres obowiązywania profilu tymczasowego wcześniej niż zaplanowano, należy przejść do menu **Ustawienia > Profil tymczasowy** i wybrać opcję **STOP**.




## Wylogowanie

Aby wylogować się z konta aplikacji Eversense XL, należy wybrać opcję

**Ustawienia > Wyloguj.**

8

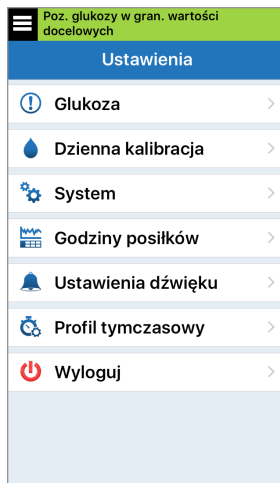

### Ostrzeżenie

Wartości stężenia glukozy nie będą wyświetlane po wylogowaniu z Eversense App, do czasu ponownego zalogowania. Na pewno chcesz się wylogować?

Nie

Tak

**WAŻNE:** po wylogowaniu się z aplikacji Eversense XL nie będzie można przeglądać danych dotyczących poziomu glukozy do czasu ponownego zalogowania. Ponowne zalogowanie do aplikacji wymaga wprowadzenia adresu e-mail oraz hasła, ustalonego podczas rejestracji konta.

## 9. Opisy alertów

*Rozdział opisuje komunikaty alertów i powiadomień wyświetlane na ekranie aplikacji Eversense XL wraz z opisem postępowania.*

System Eversense XL CGM generuje alerty i powiadomienia odnoszące się do odczytów poziomu glukozy, stanu systemu w inteligentnym nadajniku oraz w urządzeniu przenośnym. Inteligentny nadajnik generuje alerty wibracyjne odczuwane na ciele użytkownika systemu po osiągnięciu ustawionej wartości progowej danego alertu. Aplikacja mobilna emituje dźwięk alertu i wyświetla powiązany z alertem komunikat na ekranie **MOJA GLUKOZA**. Tabela opisuje wzory wibracji generowanych przez inteligentny nadajnik oraz wskaźniki w aplikacji mobilnej.

Alerty i powiadomienia	Inteligentny nadajnik Wzór wibracji	Wskaźniki alertów w aplikacji
<b>Alerty informujące o braku możliwości wyświetlenia wartości poziomu glukozy</b> W takiej sytuacji należy natychmiast podjąć stosowne działania.	3 długie wibracje	<b>POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT W KOLORZE ŻÓŁTYM</b>
<b>Alerty odnoszące się do odczytów niskich wartości glukozy</b> Alert niskiej glukozy. Wymaga natychmiastowego podjęcia stosownych działań.	3 krótkie wibracje x 3	<b>POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT W KOLORZE ŻÓŁTYM</b>
<b>Alert niskiej wartości przewidywanej lub niskiego poziomu glukozy poza zakresem</b> Wymaga natychmiastowego podjęcia stosownych działań.	3 krótkie wibracje	<b>POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT W KOLORZE ŻÓŁTYM</b>
<b>Alerty odnoszące się do odczytów wysokiego poziomu glukozy</b> Alert wysokiego poziomu glukozy, wysokiej wartości predykcyjnej lub wysokiego poziomu poza zakresem. W takiej sytuacji należy natychmiast podjąć stosowne działania.	1 długa wibracja i 2 krótkie wibracje	<b>POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT W KOLORZE ŻÓŁTYM</b>
<b>Alerty odnoszące się do mniej krytycznych sytuacji</b> Wymagają reakcji, ale nie muszą mieć charakteru krytycznego. Przykłady podano w kolejnym rozdziale.	1 krótka wibracja	<b>POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT W KOLORZE ŻÓŁTYM</b>
<b>Powiadomienia</b> Wymagają reakcji, ale nie mają charakteru krytycznego. Przykłady podano w kolejnym rozdziale.	1 krótka wibracja	<b>POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT W KOLORZE NIEBIESKIM</b>

## Historia alertów

Ekran **HISTORIA ALERTÓW** zawiera odebrane alerty i powiadomienia.

Wagę danego komunikatu wskazują następujące ikony.



Alerty



Powiadomienia



Więcej niż 1 alert  
w tym samym okresie




Alerty baterii

**Uwaga:** po odebraniu 2 lub więcej alertów, które nie zostały potwierdzone, aplikacja wyświetli opcję **Zignoruj wszystkie**.

Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy, gdy urządzenie przenośne było poza zasięgiem nadajnika, a następnie zostało ponownie zsynchronizowane. Wszystkie alerty można przeglądać na ekranie **Historia alertów**.

### 1. Wybierz opcję **Menu > Historia alertów**.


- Ekran **HISTORIA ALERTÓW** pokazuje **WSZYSTKIE** alerty i powiadomienia w danym dniu.
- Więcej informacji można uzyskać po wybraniu konkretnego komunikatu.

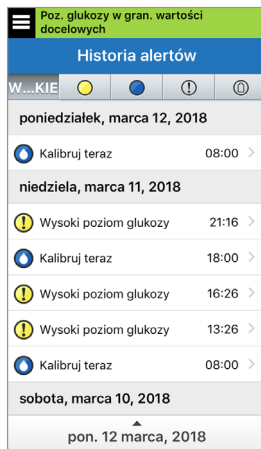

Przykładowy ekran **WSZYSTKIE**

### 2. Możesz wybrać filtrowanie wyświetlanych komunikatów (alertów i powiadomień), dotykając wybranych ikon alertów.

- Wybierz opcję **WSZYSTKIE**, a następnie wybierz wzór ikony, w górnej części ekranu, aby wybrać wyświetlanie tylko tych konkretnych alertów.
- Po zakończeniu wybierz opcję **Menu**.

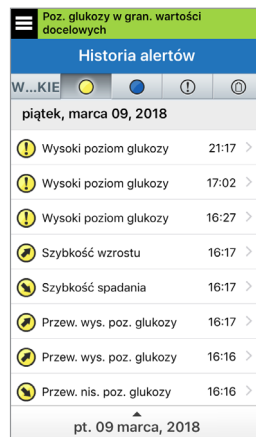

Przykładowy ekran samych alertów





# Opisy alertów i wymagane działania

W poniższej tabeli przedstawiono alerty i powiadomienia, występujące w aplikacji Eversense XL.

**Uwaga:** aby uzyskać dodatkowe informacje o danym komunikacie, należy wybrać ikonę .



**WAŻNE:** W aplikacji i w inteligentnym nadajniku nie można wyłączyć alertów wibracyjnych odczuwanych na ciele, oznaczonych \*, przy użyciu trybu „Nie przeszkadzać” w ustawieniach aplikacji.

## Alerty

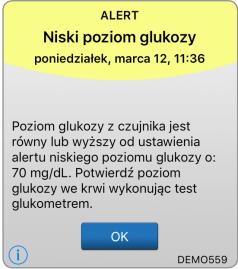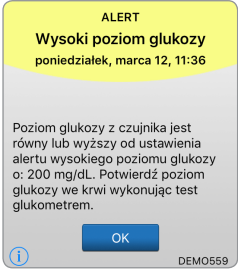Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<b>Niski poziom glukozy*</b> Pojawia się z częstotliwością wpisaną w ustawieniach dźwięku, kiedy wartość odczytu poziomu glukozy z czujnika jest równa lub mniejsza od ustawionej wartości granicznej alertu poziomu glukozy. Wartość domyślna częstotliwości powtarzania to 15 minut.	<b>Wysoki poziom glukozy*</b> Pojawia się z częstotliwością wpisaną w ustawieniach dźwięku, kiedy wartość odczytu poziomu glukozy z czujnika jest równa lub większa od ustawionej wartości granicznej alertu poziomu glukozy. Wartość domyślna częstotliwości powtarzania to 30 minut.
Działania	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru.	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru.



## Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

### Alerty

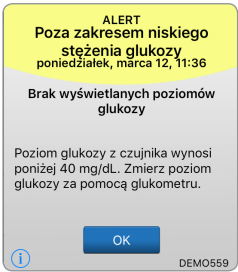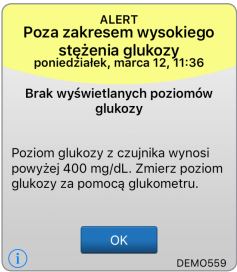Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<p><b>Poza zakresem niskiego stężenia glukozy*</b></p> <p>Pojawia się wtedy, gdy odczyt poziomu glukozy ma wartość niższą niż 40 mg/dL.</p> <p>Wynik pomiaru nie jest wyświetlany (na ekranie <b>MOJA GLUKOZA</b> pojawia się komunikat <b>NIS.</b>)</p>	<p><b>Poza zakresem wysokiego stężenia glukozy*</b></p> <p>Pojawia się wtedy, gdy odczyt poziomu glukozy ma wartość wyższą niż 400 mg/dL.</p> <p>Wynik pomiaru nie jest wyświetlany (na ekranie <b>MOJA GLUKOZA</b> pojawia się komunikat <b>WYS.</b>)</p>
Działania	<p>Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru. Wartości glukozy zmierzone przez czujnik zaczną być ponownie wyświetlane, gdy osiągną wartość równą lub większą niż 40 mg/dL.</p>	<p>Zmierz poziom glukozy ręcznie, używając glukometru. Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii zawsze potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru.</p> <p>Wartości glukozy zmierzone przez czujnik zaczną być ponownie wyświetlane, gdy osiągną wartość równą lub niższą niż 400 mg/dL.</p>



# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

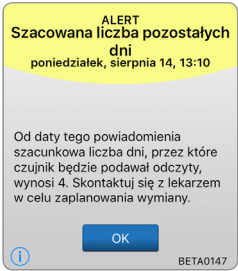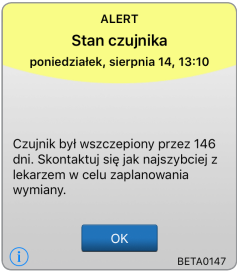Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<b>Dni do końca (4)</b> Pojawia się, gdy system wykryje, że za 4 dni czujnik może przestać dostarczać odczyty.	<b>Stan czujnika (146 dni)</b> Pojawia się, gdy system wykryje, że czujnik został wszczepiony 146 dni wcześniej.
Działania	Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia, aby uzgodnić termin wymiany czujnika na nowy.	Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia, aby uzgodnić termin wymiany czujnika na nowy.



## Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

### Alerty

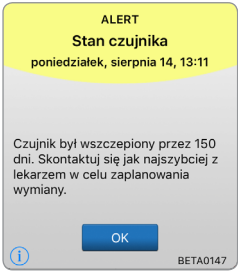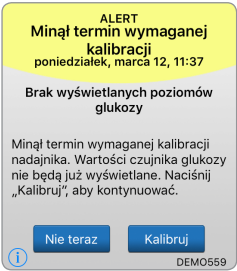Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<b>Stan czujnika (150 dni)</b> Pojawia się, gdy system wykryje, że czujnik został wszczepiony 150 dni wcześniej.	<b>Minął termin wymaganej kalibracji</b> Pojawia się wtedy, gdy minęła godzina zaplanowanej kalibracji.  Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu przeprowadzenia kalibracji.
Działania	Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia, aby uzgodnić termin wymiany czujnika na nowy.	Wykonaj kalibrację przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszka palca w celu przywrócenia wyświetlania wartości poziomu glukozy.



# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

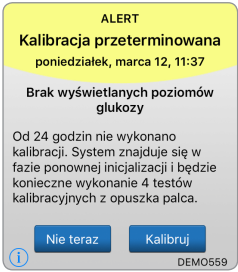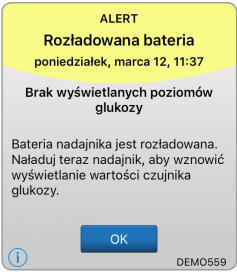Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<p><b>Kalibracja przeterminowana</b></p> <p>Pojawia się wtedy, gdy kalibracja nie została przeprowadzona w ciągu ostatnich 24 godzin. System wraca do fazy inicjalizacji.</p> <p>Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu przeprowadzenia kalibracji.</p>	<p><b>Rozładowana bateria*</b></p> <p>Pojawia się jednokrotnie, gdy bateria inteligentnego nadajnika jest rozładowana i wymaga naładowania.</p> <p>Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu naładowania baterii inteligentnego nadajnika.</p>
Działania	<p>W fazie inicjalizacji musisz wykonać 4 testy kalibracyjne przy użyciu próbek krwi pobranych z opuszka palca w odstępie od 2 do 12 godzin.</p> <p>Wyświetlanie odczytów poziomu glukozy zostanie wznowione po 2. pomyślnej próbie kalibracyjnej na podstawie próbki krwi pobranej z opuszka palca.</p>	<p>Niezwłocznie naładuj baterię nadajnika. Przed podłączeniem nadajnika do zasilania zdejmij go z ramienia.</p>



# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

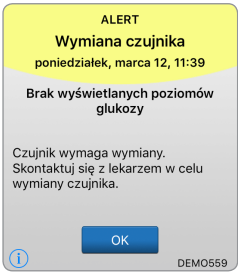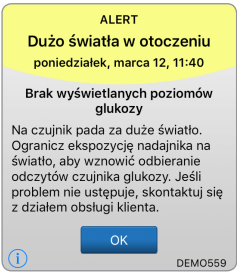Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<p><b>Wymiana czujnika*</b></p> <p>Pojawia się, gdy czujnik wymaga wymiany.</p> <p>Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu wymiany czujnika.</p>	<p><b>Dużo światła w otoczeniu</b></p> <p>Pojawia się co 60 minut, gdy czujnik otrzymuje za dużo światła z pomieszczenia, co skutkuje pogorszeniem jego komunikacji z inteligentnym nadajnikiem.</p> <p>Odczyty poziomu nie będą wyświetlane do czasu zmniejszenia ilości światła.</p>
Działania	<p>Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu wymiany czujnika.</p>	<p>Wykonaj jedną z poniższych czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Przenieś się w mniej oświetlone miejsce.</li><li>• Osłoń inteligentny nadajnik kawałkiem ciemnego materiału.</li><li>• Noś nadajnik pod ubraniem.</li></ul>



# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

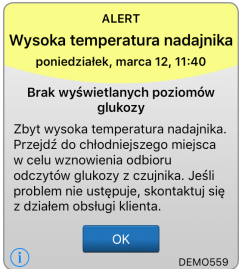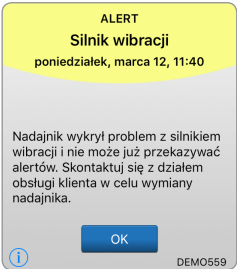Wyświetlacz aplikacji	 <p>ALERT <b>Wysoka temperatura nadajnika</b> poniedziałek, marca 12, 11:40</p> <p>Brak wyświetlanych poziomów glukozy</p> <p>Zbyt wysoka temperatura nadajnika. Przejdź do chłodniejszego miejsca w celu wznowienia odbioru odczytów glukozy z czujnika. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z działem obsługi klienta.</p> <p>OK</p> <p>DEMO559</p>	 <p>ALERT <b>Silnik wibracji</b> poniedziałek, marca 12, 11:40</p> <p>Nadajnik wykrył problem z silnikiem wibracji i nie może już przekazywać alertów. Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu wymiany nadajnika.</p> <p>OK</p> <p>DEMO559</p>
Opis	<p><b>Wysoka temperatura inteligentnego nadajnika*</b></p> <p>Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura inteligentnego nadajnika jest zbyt wysoka.</p> <p>Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane, do momentu temperatura robocza inteligentnego nadajnika nie wróci do normy.</p>	<p><b>Silnik wibracji</b></p> <p>Pojawia się co 60 minut, gdy silnik wibracji w inteligentnym nadajniku nie może już generować alertów odczuwanych na ciele. Odczyty glukozy będą dostępne do odczytu na ekranie przez maksymalnie 72 godziny od pojawienia się tego komunikatu. Po upływie tego okresu komunikat alertu błędu nadajnika będzie pojawiał się co 20 minut do czasu jego wymiany.</p>
Działania	<p>Należy obniżyć temperaturę nadajnika, przenosząc go w chłodniejsze miejsce. Nadajnik wznowi wyświetlanie poziomu glukozy, gdy jego temperatura spadnie poniżej 42°C.</p> <p>Możesz zdjąć nadajnik na jakiś czas, aby go schłodzić. Pamiętaj, aby ponownie umieścić nadajnik nad czujnikiem, kiedy jego temperatura spadnie.</p>	<p>Skontaktuj się z działem obsługi klienta w celu niezwłocznego przeprowadzenia wymiany nadajnika.</p>

## Opisy alertów i wymagane działania (cd.)



### Alerty

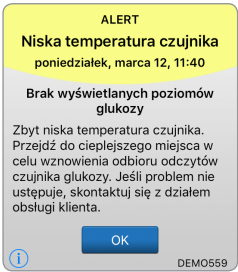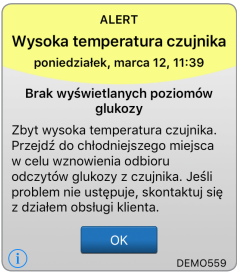Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<p><b>Niska temperatura czujnika*</b></p> <p>Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura czujnika jest zbyt niska.</p> <p>Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane, do momentu gdy temperatura robocza czujnika nie wróci do normy.</p>	<p><b>Wysoka temperatura czujnika*</b></p> <p>Pojawia się co 20 minut, gdy temperatura czujnika jest zbyt wysoka. Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane, do momentu gdy temperatura robocza czujnika nie wróci do normy.</p>
Działania	<p>Przejdź w cieplejsze miejsce, aby ogrzać czujnik. Pozostaw inteligentny nadajnik włączony, aby móc odbierać wyniki pomiarów glukozy, kiedy temperatura czujnika wróci do zakresu od 26 do 40°C (od 81 do 104°F).</p>	<p>Przejdź w chłodniejsze miejsce, aby schłodzić czujnik. Na krótko zdejmij nadajnik, aż temperatura czujnika obniży się do zakresu od 26 do 40°C (od 81 do 104°F). Następnie umieść nadajnik z powrotem na czujniku w celu wznowienia możliwości odbierania odczytów poziomu glukozy z czujnika.</p>





# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

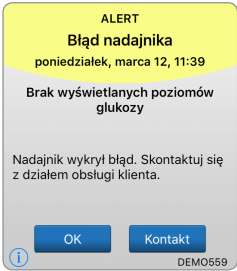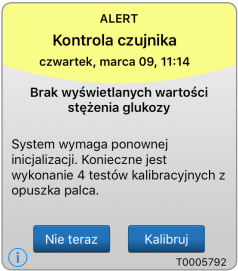Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<p><b>Błąd inteligentnego nadajnika*</b></p> <p>Pojawia się wtedy, gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje błąd nadajnika.</p> <p>Odczyty poziomu glukozy nie będą wyświetlane do czasu usunięcia błędu.</p>	<p><b>Kontrola czujnika</b></p> <p>Pojawia się jednorazowo, wtedy gdy układ autodiagnostyki systemu wykryje brak stabilności czujnika, co wymaga powrotu do kalibracji w fazie inicjalizacji.</p>
Działania	<p>Jeżeli poziom glukozy nie wyświetla się przez dłużej niż 10 minut, podłącz inteligentny nadajnik do gniazda ściennego, a następnie odłącz go. Zaczekaj 10 minut.</p> <p>Jeżeli poziom glukozy w dalszym ciągu nie jest wyświetlany, wykonaj czynności opisane w części Rozwiązywanie problemów, aby zresetować inteligentny nadajnik. Jeżeli nie jesteś w stanie zresetować nadajnika, skontaktuj się z działem obsługi klienta.</p>	<p>W fazie inicjalizacji musisz wykonać 4 testy kalibracyjne przy użyciu próbek krwi pobranych z opuszcza palca w odstępie od 2 do 12 godzin. Wyświetlanie odczytów poziomu glukozy zostanie wznowione po 2. pomyślnej próbie kalibracyjnej na podstawie próbki krwi pobranej z opuszcza palca.</p>



## Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

### Alerty

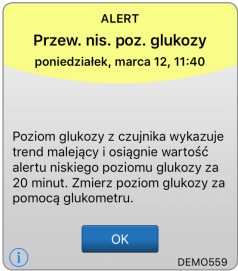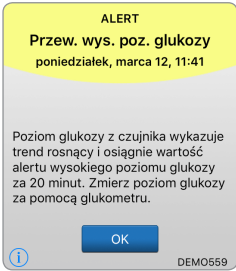Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<b>Przewidywany wysoki poziom stężenia glukozy</b> Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy wykazują trend zniżkowy i osiągną wartość progową alertu niskiego poziomu glukozy w czasie wprowadzonym na ekranie Ustawienia.	<b>Przewidywany wysoki poziom stężenia glukozy</b> Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy wykazują trend zwyżkowy i osiągną wartość progową alertu wysokiego poziomu glukozy w czasie wprowadzonym na ekranie Ustawienia.
Działania	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru.	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru.



# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

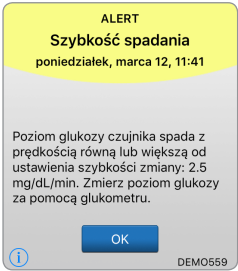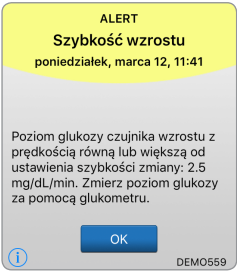Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<b>Szybkość spadania</b> Pojawia się co 60 minut, gdy wartości poziomu glukozy spadają w tempie równym lub większym od wartości wprowadzonej na ekranie Ustawienia.	<b>Szybkość wzrostu</b> Pojawia się co 60 minut, wartości poziomu glukozy rosną w tempie równym lub większym od wartości wprowadzonej na ekranie Ustawienia.
Działania	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru.	Zwróć szczególną uwagę na wartości poziomu glukozy, objawy i trendy. Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii potwierdź wartość poziomu glukozy za pomocą glukometru.



# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

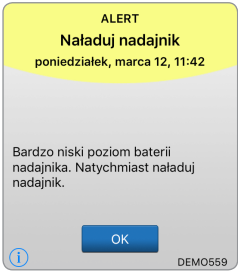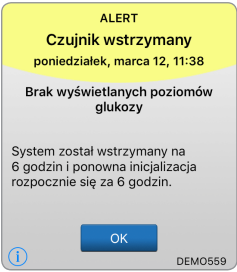Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<b>Naładuj inteligentny nadajnik</b> Pojawia się, gdy bateria inteligentnego nadajnika jest rozładowana i będzie wkrótce wymagać ładowania.	<b>Czujnik wstrzymany</b> Pojawia się, gdy autodiagnostyka systemu wykryje konieczność zrestartowania fazy inicjalizacji w celu wykonania dodatkowych kalibracji. Wartości poziomu glukozy będą wyświetlane po upływie kilku minut od drugiej pomyślnej kalibracji w fazie inicjalizacji.
Działania	Możliwie jak najszybciej naładuj baterię inteligentnego nadajnika.	Ponowna inicjalizacja systemu rozpocznie się za 6 godzin.

# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

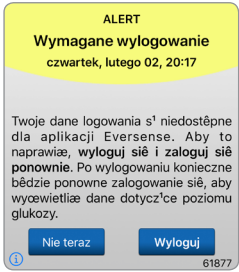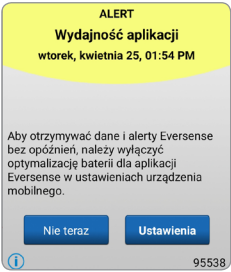Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<b>Wymagane wylogowanie</b> Pojawia się co 24 godziny w przypadku użytkowników iOS, gdy system wykryje, że dane uwierzytelniające Eversense nie są dostępne za pośrednictwem funkcji pęku kluczy iOS.	<b>Wydajność aplikacji*</b> Pojawia się codziennie w systemach operacyjnych Android, kiedy system wykryje częste awarie aplikacji lub przerwy w komunikacji Bluetooth spowodowane uwzględnieniem aplikacji Eversense w ustawieniach optymalizacji baterii.
Działania	Wyloguj się z aplikacji mobilnej i zaloguj się ponownie, używając istniejącej nazwy użytkownika i hasła.	Przejdź do ustawień optymalizacji baterii w telefonie i wyłącz aplikację Eversense, aby nie dochodziło do opóźnienia alertów Eversense.



## Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

### Alerty

Wyświetlacz aplikacji	<div data-bbox="301 204 557 380"><p><b>Kalibreringsgjennomgang pågår</b></p><p>Kalibreringsverdien som du har angitt 390 mg/dL kan være unøyaktig. Kalibrer på nytt om 1 time for å sikre glukosenøyaktighet.</p><p>OK</p></div>	<div data-bbox="810 204 1066 380"><p><b>Nie zgodne oprogramowanie nadajnika</b></p><p>Wykryto niezgodne oprogramowanie nadajnika. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.</p><p>OK</p></div>
Opis	<p><b>Weryfikacja kalibracji</b></p> <p>Pojawia się, gdy wartość kalibracji różni się znacząco od wartości pokazywanej przez glukometr.</p>	<p><b>Nie zgodne oprogramowanie nadajnika</b></p> <p>Pojawia się, gdy oprogramowanie sprzętowe inteligentnego nadajnika nie jest zgodne z wersją aplikacji mobilnej Eversense na urządzeniu przenośnym.</p>
Działania	<p>Przeprowadź ponowną kalibrację po wyświetleniu stosownego monitu.</p>	<p>Skontaktuj się z działem obsługi klienta.</p>


# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Alerty

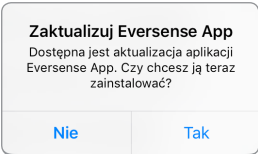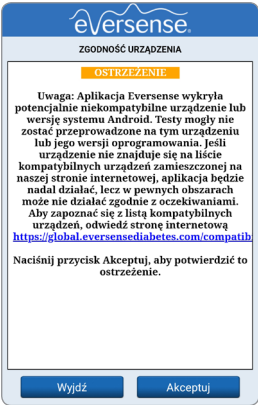Wyświetlacz aplikacji	 <p>Zaktualizuj Eversense App</p> <p>Dostępna jest aktualizacja aplikacji Eversense App. Czy chcesz ją teraz zainstalować?</p> <p>Nie Tak</p>	 <p>9</p>
Opis	<p><b>Zaktualizuj Eversense XL App</b></p> <p>Pojawia się, gdy nowa wersja aplikacji Eversense XL jest gotowa do pobrania.</p>	<p><b>Niezgodne urządzenie / system operacyjny</b></p> <p>Pojawia się, gdy aplikacja używana jest z niezgodnym urządzeniem / systemem operacyjnym.</p>
Działania	<p>Wybierz opcję <b>Tak</b>, aby zainstalować aktualizację.</p>	<p>Wykaz zgodnych urządzeń / systemów operacyjnych znajduje się na stronie <a href="https://global.eversensediabtes.com/compatib">https://global.eversensediabtes.com/compatib</a>.</p>

# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)



## Powiadomienia

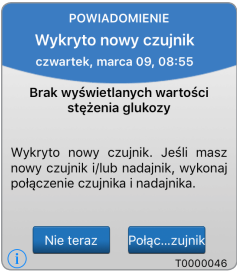Wyświetlacz aplikacji		
Opis	<p><b>Kalibruj teraz</b> Pojawia się co 60 minut, gdy nadejdzie czas zaplanowanej kalibracji.</p>	<p><b>Wykryto nowy czujnik</b> Pojawia się, gdy inteligentny nadajnik wykryje nowy czujnik. W celu nawiązania komunikacji wszczepiony czujnik i inteligentny nadajnik muszą zostać połączone.</p>
Działania	<p>Wykonaj test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszka palca i wprowadź odczyt jako wartość kalibracji. Do kalibrowania systemu NIE WOLNO używać wartości poziomu glukozy z próbki krwi pobranej z innego miejsca (przedramię lub dłoń).</p>	<p>Wybierz opcję <b>Połącz czujnik</b>, aby zakończyć proces łączenia i rozpocząć 24-godzinną fazę nagrzewania. Nie musisz nosić inteligentnego nadajnika na ramieniu nad czujnikiem do czasu zakończenia fazy nagrzewania.</p>



# Opisy alertów i wymagane działania (cd.)

## Powiadomienia

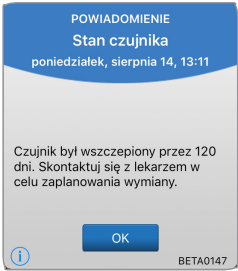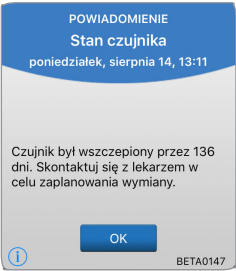Wyświetlacz aplikacji	 <p>The alert screen for 120 days shows the title 'POWIADOMIENIE Stan czujnika' and the date 'poniedziałek, sierpnia 14, 13:11'. The main text reads: 'Czujnik był wszczepiony przez 120 dni. Skontaktuj się z lekarzem w celu zaplanowania wymiany.' There is an 'OK' button and an information icon at the bottom left. The device ID 'BETA0147' is at the bottom right.</p>	 <p>The alert screen for 136 days shows the title 'POWIADOMIENIE Stan czujnika' and the date 'poniedziałek, sierpnia 14, 13:11'. The main text reads: 'Czujnik był wszczepiony przez 136 dni. Skontaktuj się z lekarzem w celu zaplanowania wymiany.' There is an 'OK' button and an information icon at the bottom left. The device ID 'BETA0147' is at the bottom right.</p>
Opis	<b>Stan czujnika (120 dni)</b> Pojawia się, gdy system wykryje, że czujnik został wszczepiony 120 dni wcześniej.	<b>Stan czujnika (136 dni)</b> Pojawia się, gdy system wykryje, że czujnik został wprowadzony 136 dni wcześniej.
Działania	Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia w celu ustalenia terminu wymiany czujnika.	Skontaktuj się z pracownikiem służby zdrowia, aby uzgodnić termin wymiany czujnika na nowy.

# 10. Dziennik zdarzeń

Rozdział opisuje sposób wyświetlania i rejestrowania zdarzeń monitorowania zmian poziomu glukozy.

Oprócz ciągłego monitorowania poziomów glukozy system Eversense XL CGM umożliwia rejestrowanie i śledzenie zdarzeń. Zdarzenia można wprowadzać ręcznie. Będą się one pojawiały na wykresie trendu i w raportach poziomu glukozy. Rejestrowanie typu zdarzeń ma na celu zaobserwowanie prawidłowości w profilu poziomu glukozy.

## Rodzaje zdarzeń:

-  Glukoza
-  Posiłek
-  Insulina
-  Zdrowie
-  Ćwiczenie

**Uwaga:** dostęp do ekranu **DODAJ ZDARZENIE** można także uzyskać z ekranu **MOJA GLUKOZA**, wybierając dowolne miejsce obszaru wykresu.

## Przeglądanie zdarzeń

Przeszłe zdarzenia można przeglądać na ekranie

### DZIENNIK ZDARZEŃ.

#### 1. Wybierz opcję Menu >








#### Dziennik zdarzeń.

Pojawi się ekran **DZIENNIK ZDARZEŃ**.

#### 2. Ekran zawiera wszystkie wprowadzone zdarzenia.

Można wybrać przeglądanie określonego rodzaju zdarzeń, wybierając określony typ zdarzenia.

- Wybierz opcję **WSZYSTKIE**, następnie wybierz ikonę w górnej części ekranu, aby wybrać wyświetlanie tylko tych typów zdarzeń, które są oznaczone tymi ikonami.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych		
Dziennik zdarzeń +		
W...		
poniedziałek, marca 12, 2018		
	Kalibracja, 148 mg/dL	09:45 >
	Insulina, 3.0 jednostek	08:34 >
	Kalibracja, 86 mg/dL	08:02 >
	Śniadanie, 15 gramów	07:34 >
niedziela, marca 11, 2018		
	Ćwiczenie, 1godz. 2min	19:34 >
	Kalibracja, 161 mg/dL	18:02 >
	Kolacja, 32 gramów	17:35 >
pon. 12 marca, 2018		

## Rejestrowanie określonych zdarzeń



### Poziom glukozy

Umożliwia wprowadzanie i monitorowanie wyników testów wykonanych przy użyciu glukometru (wyniki inne niż na potrzeby kalibracji).

1. Wybierz opcję **Menu > Dziennik zdarzeń**.
2. Dodaj zdarzenie przy użyciu ikony zdarzenia „+” > **Glukoza**.
3. Wybierz opcję **Godzina**, aby wprowadzić datę i godzinę.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
4. Wybierz opcję **Glukoza**, aby wprowadzić prawidłową wartość stężenia glukozy.  
Wybierz opcję **Zapisz**.

**Uwaga:** można wprowadzić wartość stężenia glukozy w zakresie od 20 do 600 mg/dL. Na potrzeby obliczeń i wyświetlania wprowadzone wartości mniejsze od 20 mg/dL zostaną przekonwertowane na 20, zaś wprowadzone wartości większe od 600 mg/dL zostaną przekonwertowane na 600.

5. Wybierz opcję **Zapisz**.
6. Pojawi się okno **Potwierdź poziom glukozy** wybierz opcję **Zatwierdź**, aby potwierdzić zdarzenie dotyczące poziomu glukozy i wrócić do ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ**, lub wybierz opcję **Anuluj**, aby wyjść bez zapisywania zmian lub edytować informacje przed ich zapisaniem.

**Uwaga:** zdarzenia dotyczące poziomu glukozy nie zastępują pomiarów kalibracyjnych. Należy w dalszym ciągu wprowadzać wartości pomiarów kalibracyjnych.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych		
Anuluj	Glukoza	Zapisz
Godzina	mar 12, 2018 10:40	>
Glukoza	100 mg/dL	>
Notatki		

Potwierdź poziom glukozy

Godzina: mar 12, 2018 10:40  
Wartość: 100 mg/dL

Anuluj | Zatwierdź

iOS

Potwierdź wartość stężenia glukozy

Godzina: 16:57  
Wartość: 100 mg/dl

Anuluj | Wyslij

Android



## Posiłek

Zdarzenie opisujące rodzaj posiłku, datę i godzinę oraz ilość węglowodanów.

1. Wybierz opcję **Menu > Dziennik zdarzeń**.
2. Dodaj zdarzenie przy użyciu ikony zdarzenia „+” > **Posiłek**.
3. Wybierz opcję **Godzina**, aby wprowadzić datę i godzinę.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
4. Wybierz opcję **Typ**, aby wprowadzić rodzaj posiłku.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
5. Wybierz opcję **Węglowodany**, aby wprowadzić ilość węglowodanów.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz opcję **Notatki**, aby wprowadzić uwagi.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać wprowadzoną wartość i wrócić do ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ**. Aby wyjść bez zapisywania zmian, wybierz opcję **Anuluj**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych		
Anuluj	Posiłek	Zapisz
Godzina	mar 12, 2018 10:40 >	
Typ	Śniadanie >	
Węglowodany	15 gramów >	
Notatki	>	



## Insulina

Zdarzenie opisujące jednostki insuliny z uwzględnieniem godziny i typu insuliny.

1. Wybierz opcję **Menu > Dziennik zdarzeń**.
2. Dodaj zdarzenie przy użyciu ikony „**+**” > **Insulina**.
3. Wybierz opcję **Godzina**, aby wprowadzić datę i godzinę.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
4. Wybierz opcję **Jednostki**, aby wprowadzić właściwą liczbę jednostek.  
Wybierz opcję **Zapisz**.  
  
**Uwaga:** maksymalna liczba jednostek insuliny, jaką można wprowadzić, to 200 U.
5. Wybierz opcję **Typ**, aby wprowadzić odpowiedni rodzaj insuliny.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz opcję **Notatki**, aby wprowadzić uwagi.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać wprowadzoną wartość i wrócić do ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ**. Aby wyjść bez zapisywania zmian, wybierz opcję **Anuluj**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych		
Anuluj	Insulina	Zapisz
Godzina	mar 12, 2018 10:40 >	
Jednostki	3.0 >	
Typ	Szybkodziałająca >	
Notatki	>	



## Stan zdrowia

Typ zdarzenia opisujący stan zdrowia z uwzględnieniem daty i godziny.

1. Wybierz opcję **Menu > Dziennik zdarzeń**.
2. Dodaj zdarzenie przy użyciu ikony „+” > **Zdrowie**.
3. Wybierz opcję **Godzina**, aby wprowadzić datę i godzinę.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
4. Wybierz opcję **Nasilenie**, aby wprowadzić nasilenie dolegliwości:  
niskie, średnie lub wysokie.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
5. Wybierz opcję **Stan**, aby wprowadzić dolegliwość.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz opcję **Notatki**, aby wprowadzić uwagi.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać wprowadzoną wartość i wrócić do ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ**. Aby wyjść bez zapisywania zmian, wybierz opcję **Anuluj**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych		
Anuluj	Zdrowie	Zapisz
Godzina	mar 12, 2018 10:41 >	
Nasilenie	Średni >	
Stan	Stres >	
Notatki	>	



## Ćwiczenie

Typ zdarzenia opisujący intensywność oraz czas trwania aktywności fizycznej.

1. Wybierz opcję **Menu > Dziennik zdarzeń**.
2. Dodaj zdarzenie przy użyciu ikony „+” > **Ćwiczenie**.
3. Wybierz opcję **Godzina**, aby wprowadzić datę i godzinę.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
4. Wybierz opcję **Nasilenie**, aby wprowadzić intensywność wysiłku:  
niską, średnią lub wysoką.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
5. Wybierz opcję **Czas trwania**, aby wprowadzić czas trwania aktywności fizycznej.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
6. Wybierz opcję **Notatki**, aby wprowadzić uwagi.  
Wybierz opcję **Zapisz**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać wprowadzone dane i wrócić do ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ**. Aby wyjść bez zapisywania zmian, wybierz opcję **Anuluj**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych		
Anuluj	Ćwiczenie	Zapisz
Godzina	mar 12, 2018 10:41	>
Intensywność	Średni	>
Czas trwania	1godz. 2min	>
Notatki		>

## II. Raporty

---

*Rozdział opisuje dostępne raporty poziomu glukozy obrazujące profil glukozy użytkownika systemu (na podstawie określonych dat i przedziałów czasowych). Użytkownik może wybrać określone daty lub zaprogramowane przedziały czasu.*

### Rodzaje raportów

- Tygodniowe zestawienie modalne.
- Wykres kołowy poziomu glukozy.
- Raport statystyk poziomu glukozy.

**Uwaga:** należy upewnić się, że data i godzina ustawione w urządzeniu przenośnym są prawidłowe. Dokładność wykresów i raportów uzależniona jest od prawidłowo ustawionej daty i godziny.

11

Aby przeglądać raporty poziomu glukozy, wybierz opcję **Menu > Raporty**, a następnie przejrzyj trzy różne raporty, przewijając ekran. Istnieje możliwość wysłania każdego z raportów na swój adres e-mail, wybierając ikonę raportu w prawym górnym rogu ekranu.




## Tygodniowe zestawienie modalne

Raport zawiera odczyty pomiarów glukozy z ostatnich 7 dni, podsumowane w postaci 24-godzinowego wykresu liniowego, który pomaga w ustaleniu prawidłowości dobowych.

- **Linia niebieska** to średnia wartość z ostatnich 7 dni pomiarów w bloku godzinowym.
- **Słupki czerwone** pokazują najwyższe i najniższe odczyty w tym samym bloku godzinowym.
- **Czerwone poziome linie przerywane** to zaprogramowane wartości graniczne alertów wysokiego i niskiego poziomu glukozy.
- **Zielone poziome linie przerywane** to zaprogramowane wartości docelowe wysokiego i niskiego poziomu glukozy.


Raport oferuje także podsumowanie statystyczne (średnie odczyty, odchylenia standardowe odczytów), wartości docelowe poziomu glukozy (odsetek odczytów mieszczących się w zakresie poziomów docelowych glukozy oraz wykraczających poza górny i dolny zakres docelowy), oraz wysokie i niskie poziomy glukozy (odsetek odczytów mieszczących się w zakresie od niskiego do wysokiego poziomu docelowego). Informacje są wyświetlane na podstawie wyznaczonych pór posiłków.

**Uwaga:** informacje na temat przeglądania i modyfikowania wyznaczonych pór posiłków można znaleźć w rozdziale *Ustawianie harmonogramu posiłków*.

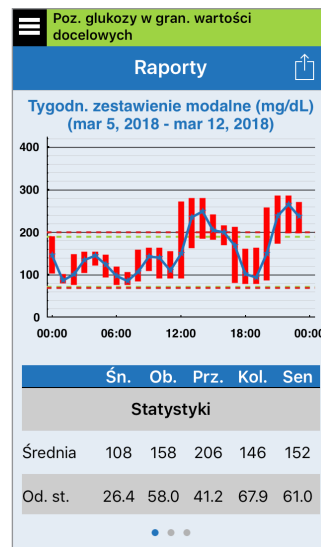


## Wykres kołowy stężenia glukozy

Raport przedstawia w formie graficznej, jaki odsetek odczytów w danym okresie mieści się w docelowym zakresie poziomu glukozy i jaki odsetek odczytów wykracza poza górny i dolny docelowy zakres poziomu glukozy. Można wybrać okres obejmujący 1, 7, 14, 30 lub 90 ostatnich dni.

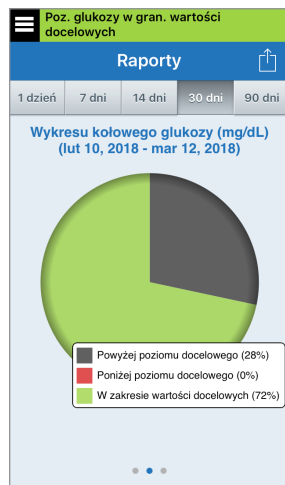

iOS

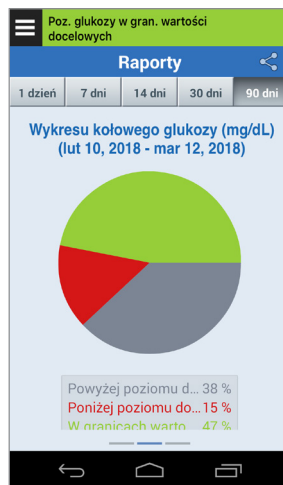

Android

## Raport statystyk poziomu glukozy

Raport przedstawia średnie, niskie i wysokie odczyty poziomu glukozy, łącznie z odchyleniem standardowym w porach posiłków. Można wybrać okres obejmujący 1, 7, 14, 30 lub 90 ostatnich dni.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych				
Raporty				
1 dzień	7 dni	14 dni	30 dni	90 dni
Statystyki wartości stężeń glukozy (mg/dL)...				
Okres	Śr.	Niska	Wys...	Od. st.
Śniadanie	108	78	163	26.4
Obiad	158	93	280	58.0
Przekąska	206	82	280	41.2
Kolacja	146	80	286	67.9
Sen	152	78	286	61.0
WSZYSTKIE	154	78	286	61.5

## 12. Funkcja Udostępnij moje dane

### Oprogramowanie do zarządzania danymi Eversense DMS

Eversense DMS Program to aplikacja sieciowa umożliwiająca pacjentom, opiekunom i pracownikom służby zdrowia przeglądanie oraz analizowanie danych dotyczących poziomu glukozy przesyłanych z inteligentnego nadajnika Eversense XL lub z aplikacji mobilnej systemu Eversense XL CGM.

To oprogramowanie jest oferowane bezpłatnie wszystkim użytkownikom systemu Eversense XL CGM. Więcej informacji na temat programu Eversense DMS można znaleźć na stronie internetowej <https://global.eversenseddiabetes.com/>.


Po utworzeniu i zarejestrowaniu swojego konta podczas instalowania aplikacji mobilnej Eversense XL konto Eversense DMS zostanie utworzone automatycznie. W Instrukcji użytkownika aplikacji Eversense NOW znajduje się więcej informacji na temat zdalnego przeglądania danych dotyczących poziomu glukozy z Systemu Eversense XL CGM.

**WAŻNE:** SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH EVERSENSE NIE DOSTARCZA PORAD MEDYCZNYCH. WSZELKIE ZMIANY W PLANIE LECZENIA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MOŻE WPROWADZAĆ WYŁĄCZNIE PRACOWNIK SŁUŻBY ZDROWIA ZAJMUJĄCY SIĘ PACJENTEM.





## Synchronizacja

Jeżeli połączenie z Internetem jest aktywne, i użytkownik jest zalogowany do aplikacji, funkcja automatycznej synchronizacji jest włączona. Wyniki pomiarów glukozy będą synchronizowane z kontem Eversense DMS co ok. 5 minut. Funkcję automatycznej synchronizacji można wyłączyć.

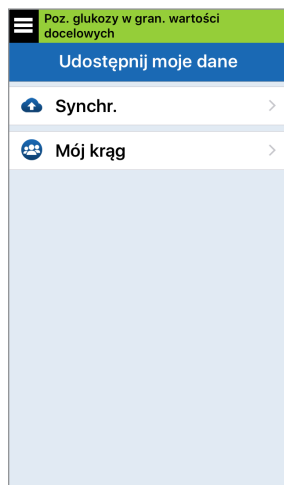

Aby wyłączyć funkcję automatycznej synchronizacji, wybierz opcję **Synchronizacja (Synchr.)** na ekranie **UDOSTĘPNIJ MOJE DANE**. Wybierz opcję **Automatyczna synchronizacja**, aby wyłączyć tę funkcję.

Aby zsynchronizować dane ręcznie, wybierz opcję **ROZPOCZNIJ SYNCHRONIZACJĘ**. Dane z wybranej liczby dni zostaną zsynchronizowane. Można wybrać domyślną liczbę dni synchronizacji danych: 1, 3, 7, 14 lub 30 dni.

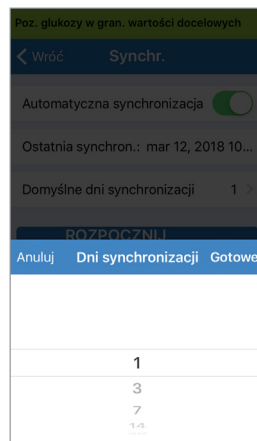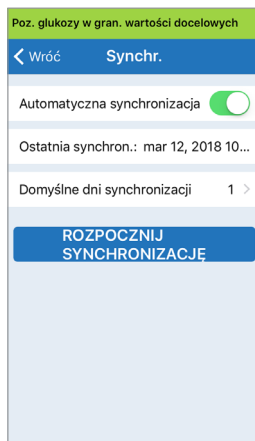


**WAŻNE:** Po wyłączeniu funkcji automatycznej synchronizacji Twoje dane nie będą wysyłane do osób używających aplikacji Eversense NOW do zdalnego monitorowania poziomu Twojej glukozy, a dane historyczne poziomu glukozy nie będą przechowywane na koncie DMS.



## Mój krąg

Mój krąg to funkcja dodatkowa umożliwiająca aktywowanie zdalnego monitorowania Twoich danych Eversense XL CGM. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w części *Mój krąg – Zdalne monitorowanie*.

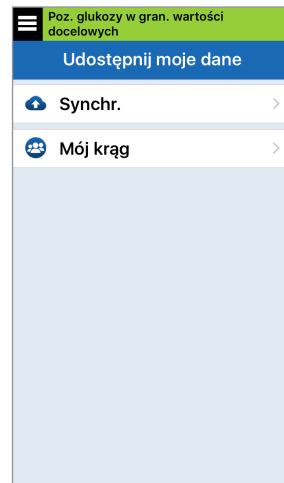

# 13. Ogólne informacje o aplikacji

Rozdział opisuje informacje dostępne w sekcji Informacje w menu głównym.

Istnieje możliwość przeglądania informacji dotyczących inteligentnego nadajnika, czujnika i aplikacji mobilnej Eversense.

1. Wybierz opcję **Menu > Informacje** a następnie wybierz opcję **Mój nadajnik**, **Mój czujnik** lub **Informacje o produkcie**.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
Informacje	
Mój nadajnik	>
Mój czujnik	>
Informacje o produkcie	>
Skontaktuj się z nami	>
Umowa licencyjna	>
Oświadczenie dotyczące prywatności	>
Pomoc	>

Na ekranie **MÓJ NADAJNIK** znajdują się informacje o nadajniku uwzględniające numer seryjny, dane dotyczące kalibracji oraz poziom naładowania baterii.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Informacje Mój nadajnik	
Nazwa	DEMO559
Numer seryjny	559
Numer modelu	102204
Wer. oprogr. sprzęt.	6.02.02d
Ostatnia kalib.	03/12/18, 09:46
Początek fazy	02/11/18, 17:28
Ukończone kalibracje	33
Bieżąca faza	Dzienna kalibracja
RSSI	-68

Ekran **MÓJ CZUJNIK** zawiera informacje dotyczące numeru seryjnego oraz dane dotyczące wszczęcia czujnika.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych	
< Informacje Mój czujnik	
Numer seryjny połączonego	7679
Data wprowadzenia	02/26/18
Godzina wprowadzenia	03:51
Wykryty numer seryjny	7679

Ekran **INFORMACJE O PRODUKCIE** zawiera informacje dotyczące wersji aplikacji mobilnej oraz firmy Senseonics, Inc., producenta systemu Eversense XL CGM.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Informacje o produkcie

  
Continuous Glucose Monitoring System

Firma: Senseonics, Inc.  
20451 Seneca Meadows  
Parkway,  
Germantown, Maryland,  
USA  
[global.eversensediabets.com](http://global.eversensediabets.com)

UDI / DI: 00817491023544

UDI / Wersja: 7.1.2

Data wydania: lip 15, 2022

Zgodność: [https://  
global.eversensediabets.com/compatibility/](https://global.eversensediabets.com/compatibility/)

© 2022 Senseonics, Inc.  
Eversense Mobile Application (CGM)



FG-9101-Q2-300



W menu Informacje można przesłać informacje zwrotne lub przejrzeć umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i politykę prywatności.

- Wybierz opcję **Kontakt**, aby wysłać wiadomość e-mail do firmy Senseonics, Inc.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

Anuluj Wiadomość do dzi... Wyślij

Do:

Dw/Udwr:

Temat: Wiadomość do działu obsługi klienta

Wiadomości te nie są monitorowane całodobowo. Nie używaj tego adresu e-mail do pilnych pytań.


-----

\*Dane nadajnika:  
NEW-DEM550

**WAŻNE:** komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest monitorowana całodobowo. **NIE WOLNO** używać tego adresu do komunikacji w sprawach związanych ze zdrowiem ani innymi nagłymi sprawami.

Aby przeczytać umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i politykę prywatności, dotknij wybranej opcji.

Poz. glukozy w gran. wartości docelowych

< Informacje 

LICENCJA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Polityka prywatności firmy Senseonics i umowa licencyjna użytkownika końcowego

Data ostatniej aktualizacji: sierpień 2016

**Wstęp**

Celem firmy Senseonics Inc. (zwaną dalej „Senseonics”, „naszą firmą” lub „firmą”) jest poprawa jakości życia osób chorujących na cukrzycę poprzez rozszerzenie możliwości kontrolowania choroby w sposób stosunkowo prosty i dokładny. W tym celu nasze produkty gromadzą określone dane osobowe oraz dane o stanie zdrowia. Nasze działania podejmujemy z poszanowaniem prywatności użytkowników, chronimy gromadzone przez nas dane użytkowników i zezwalamy użytkownikom na decydowanie o sposobie wykorzystywania takich danych oraz ich udostępnianiu.

- Zapewniamy przejrzystość naszych działań w zakresie postępowania z danymi i objaśnimy je czytelnym językiem.
- Nigdy nie sprzedajemy danych naszych użytkowników. Dane umożliwiające identyfikację użytkownika udostępniamy jedynie na wskazanie użytkownika lub w okolicznościach przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności.
- Zawsze poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych użytkowników.

Narzędzia i produkty firmy Senseonics przeznaczone do monitorowania poziomu glukozy opracowano z myślą o zapobieganiu wielu problemom występującym w przypadku

Aby znaleźć dystrybutora lokalnego na naszej stronie, dotknij opcji **Pomoc**.

# 14. Przeglądanie danych z systemu Eversense XL na urządzeniu Apple Watch

---

Urządzenie Apple Watch umożliwia przeglądanie migawek danych z systemu Eversense XL CGM. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji Eversense XL na urządzeniu przenośnym należy dodać aplikację do urządzenia Apple Watch, stosując się do zaleceń w jego instrukcji obsługi.

Pomocniczy wyświetlacz Apple Watch służy do wyświetlania danych z systemu Eversense XL CGM i nie należy używać go zamiast wyświetlacza głównego systemu Eversense XL CGM.

Wszelkie problemy z urządzeniami mobilnymi, bezprzewodowym dostępem do Internetu, połączeniem do transmisji danych, systemem zarządzania bazą danych Eversense (DMS), inteligentnym nadajnikiem użytkownika systemu CGM znajdującym się poza zasięgiem urządzenia przenośnego lub ładowanie inteligentnego nadajnika mogą spowodować, że dane będą wyświetlane z opóźnieniem lub nie będą wyświetlane.

Jeżeli w dowolnym momencie wystąpią objawy niskiego lub wysokiego poziomu glukozy LUB jeżeli objawy nie odpowiadają odczytom wartości wykrywanym przez czujnik, przed podjęciem decyzji dotyczącej terapii należy zbadać poziom glukozy za pomocą glukometru.



## Szybki podgląd


Eversense XL Apple Watch Glance nie jest dostępny dla użytkowników Apple Watch korzystających z systemu operacyjnego watchOS 3.0 lub jego nowszych wersji.

Jeżeli system operacyjny Apple Watch obsługuje funkcję szybkiego podglądu i jeżeli funkcja aplikacji Eversense XL *Pokaż szybki podgląd* została już skonfigurowana na urządzeniu Apple Watch w obszarze ustawień, aby wyświetlić szybki podgląd aplikacji Eversense XL, wystarczy przesunąć ekran **HOME** do góry.


Pojawi się pasek stanu, bieżąca wartość poziomu glukozy ze strzałką trendu oraz poziom naładowania baterii inteligentnego nadajnika.




Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, należy dotknąć ikony **Eversense XL** na ekranie **HOME** urządzenia Apple Watch w celu otworzenia aplikacji Eversense XL.

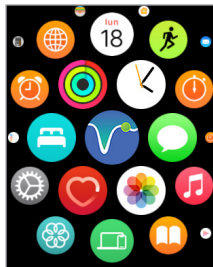


Można też otworzyć ekran **MOJA GLUKOZA** pod warunkiem włączenia powiadomień z aplikacji Eversense w ustawieniach Apple Watch. Po odebraniu powiadomienia, można także dotknąć wiadomości i przejść do ekranu **MOJA GLUKOZA**.

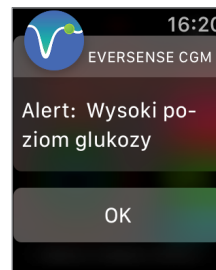


Ekran **Moja glukoza** pokazuje bieżący poziom glukozy ze strzałką trendu oraz wykres trendu na podstawie danych z systemu CGM, za ostatnie trzy godziny.

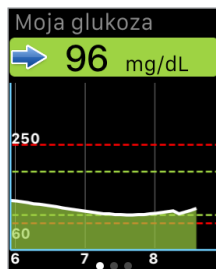

Należy przesunąć palcem w lewo, przechodząc do kolejnego ekranu, który zawiera wykres kołowy całkowitego czasu, podczas którego odczyty mieściły się w zakresie wartości docelowych oraz poza nim na przestrzeni ostatnich 24 godzin.

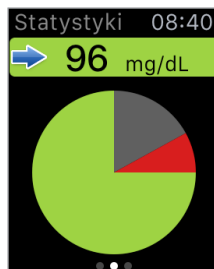

Należy przesunąć palcem w górę, aby wyświetlić dane w wartościach procentowych.

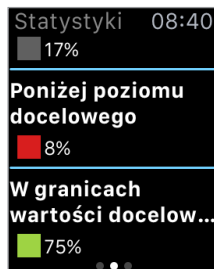

Następnie należy przesunąć palcem w lewo, do następnego ekranu, który zawiera bieżący poziom glukozy ze strzałką trendu, godzinę następnej kalibracji oraz bieżącą fazę kalibracji systemu.



# 15. Mój krąg

## Zdalne monitorowanie przy użyciu systemu Eversense XL CGM i aplikacji Eversense NOW

Aplikacja Eversense XL CGM jest wyposażona w dodatkową funkcję zdalnego monitorowania. Aplikacja Eversense XL CGM łączy się z aplikacją do zdalnego monitorowania poziomu glukozy Eversense NOW, umożliwiając innym osobom wyświetlanie Twoich danych.

### Zagrożenia

Mogą wystąpić sytuacje, gdy dane dotyczące poziomu glukozy nie będą mogły być przesłane do aplikacji Eversense NOW. Jeśli osoba z Twojego kręgu nie otrzymuje danych glukozy z Twojego systemu Eversense XL CGM, nie będzie mogła Ci pomóc w przypadku wystąpienia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy. Dodatkowy ekran oraz powiadomienia aplikacji mobilnej Eversense NOW nie zastępują głównego ekranu aplikacji mobilnej systemu Eversense XL CGM.

Członkowie Twojego kręgu nie zawsze mogą mieć połączenie służące do przesyłania danych, np. połączenie z Internetem/Wifi lub siecią 3G/4G/LTE. Jeśli Ty lub członek Twojego kręgu nie będzie dysponować połączeniem internetowym, dane o Twoim poziomie glukozy nie będą dostępne do wyświetlania na dodatkowym ekranie. Wszelkie problemy z urządzeniami mobilnymi, bezprzewodowym dostępem do Internetu, połączeniem do transmisji danych i systemem zarządzania bazą danych Eversense (DMS) oraz znalezienie się inteligentnego nadajnika poza zasięgiem urządzenia przenośnego lub ładowanie inteligentnego nadajnika mogą uniemożliwić wyświetlanie danych członkom Twojego kręgu. Nie należy zakładać, że inne osoby mające dostęp do zdalnego monitorowania Twojego poziomu glukozy, będą w stanie udzielić Ci pomocy w przypadku wystąpienia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.

Funkcja zdalnego monitorowania umożliwia dodatkowe wyświetlanie powiadomień i danych osobom w Twoim kręgu. Nie jest to system zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym.

### Korzyści

System Eversense XL CGM używany razem z aplikacją do zdalnego monitorowania Eversense NOW może dać użytkownikom systemu CGM dodatkową pewność, dzięki świadomości, że inne osoby również mogą wyświetlić ich dane z systemu CGM.

## Ostrzeżenia

- Informacje o poziomie glukozy wyświetlane w aplikacji Eversense NOW nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących terapii. Do podejmowania decyzji dotyczących terapii zawsze należy używać pomiaru poziomu glukozy we krwi wykonanego za pomocą glukometru. Podejmowanie decyzji dotyczących terapii na podstawie poziomu glukozy z czujnika może skutkować wystąpieniem podwyższonego lub obniżonego poziomu glukozy we krwi. Aplikacja Eversense NOW służy pomocniczo do wyświetlania danych z systemu Eversense XL CGM i nie należy jej używać jako ekranu głównego systemu Eversense XL CGM.
- Nie można zakładać, że osoby zdalnie monitorujące poziom Twojej glukozy poinformują Cię o zdarzeniach wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.

## Przestrogi

- Aplikacja Eversense NOW nie zastępuje schematu monitorowania pomiarów wskazanego przez lekarza prowadzącego.
- Jeśli nie masz włączonej funkcji automatycznej synchronizacji (funkcja, która umożliwia automatyczne przesyłanie danych do aplikacji Eversense NOW), nie będzie możliwe udostępnianie danych osobom w Twoim kręgu. Osoby te nie zobaczą trendów i zdarzeń wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.
- Jeśli Ty i członkowie Twojego kręgu macie połączenia z Internetem lub urządzenie przenośne użytkownika wyłączy się z powodu rozładowanej baterii, dane z systemu Eversense XL CGM nie będą wyświetlane w aplikacji Eversense NOW.
- Jeśli członkowie Twojego kręgu wyłączą dźwięk w swoich urządzeniach przenośnych, nie będą otrzymywać alertów dźwiękowych dotyczących Twoich danych CGM w swojej aplikacji Eversense NOW.
- Jeśli ustawisz stan „Offline” z którymkolwiek członkiem Twojego Kręgu, członkowie Kręgu nie będą otrzymywali Twoich danych CGM w swojej aplikacji Eversense NOW. NIE ustawiaj stanu „Offline”, jeśli chcesz, by członkowie kręgu widzieli Twoje dane CGM.
- Aplikacja Eversense NOW nie komunikuje się bezpośrednio z czujnikiem Eversense XL ani z inteligentnym nadajnikiem Eversense XL.
- Aplikacja Eversense NOW nie może zmienić ustawień aplikacji systemu Eversense XL CGM.
- W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień z aplikacji Eversense NOW nie będziesz otrzymywać alertów dotyczących poziomu glukozy od użytkowników systemu Eversense XL CGM.
- Jeśli na urządzeniu przenośnym zostanie wybrane ustawienie Nie przeszkadzać, nie będziesz słyszeć żadnych powiadomień generowanych przez aplikację Eversense NOW.

Z ekranu **MÓJ KRĄG** aplikacji mobilnej Eversense XL możesz zaprosić maksymalnie pięć osób do wyświetlania Twoich danych. Zaproszenie członka do Twojego kręgu zostanie wysłane na podany adres e-mail. Po przyjęciu zaproszenia i pobraniu aplikacji Eversense NOW członkowie kręgu będą mogli wyświetlać ostatnie dane dotyczące Twojego poziomu glukozy, zdarzeń i alertów.


**WAŻNE:** członkowie Twojego kręgu, którzy nie mają aplikacji Eversense NOW, nie będą mieć dostępu do Twoich danych.

Jeśli Twoja aplikacja systemu Eversense XL CGM oraz aplikacja Eversense NOW mają połączenie z Internetem, Twoje dane dotyczące glukozy są synchronizowane z aplikacją Eversense NOW co około 5 minut. Synchronizacja wartości kalibracji do aplikacji Eversense NOW może potrwać dłużej.

**Uwaga:** w przypadku wyłączenia funkcji Automatyczna synchronizacja dane dotyczące glukozy NIE będą dostępne w aplikacji do zdalnego monitorowania Eversense NOW.

1. Na ekranie głównym wybierz kolejno pozycje **Udostępnij Moje Dane > Mój krąg**, aby wyświetlić ekran **MÓJ KRĄG**.

2. Aby zaprosić nową osobę do wyświetlania Twoich danych glukozy, wybierz polecenie **Zaproś do mojego kręgu**.

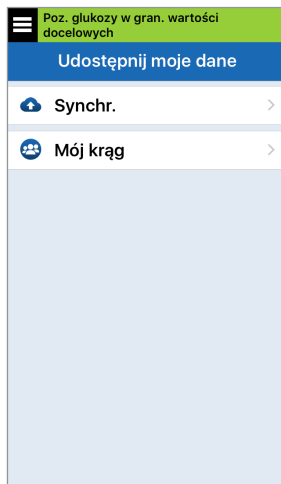


3. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić do swojego kręgu, i wybierz przycisk **Wyślij**.



**Uwaga:** możesz wybrać symbol „+” obok pola adresu e-mail, aby wybrać adres z listy kontaktów.

**Wskazówka:** przydomki są opcjonalne i służą do łatwiejszego zarządzania członkami kręgu. Jeśli zdecydujesz się nie używać przydomku dla członka kręgu, zamiast niego wyświetlany będzie adres e-mail.

4. Zostanie wyświetlony ekran **Wysłano zaproszenie**. Wybierz przycisk **OK**.

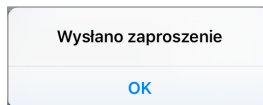


Po zaakceptowaniu zaproszenia nazwa członka zostanie wyświetlona na liście członków na ekranie **MÓJ KRĄG** w Twojej aplikacji.

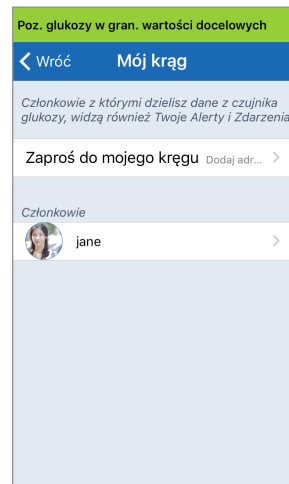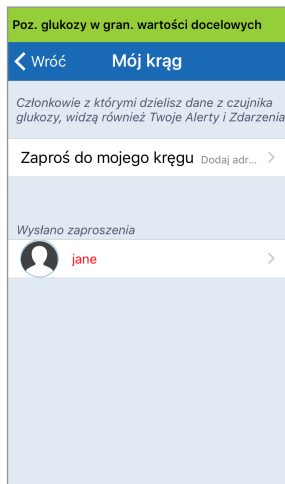




**Uwaga:** zdjęcia profilowe osób zdalnie wyświetlających Twoje dane glukozy muszą zostać skonfigurowane w koncie DMS przez właściciela konta. Nie możesz zmienić zdjęć profilowych osób zaproszonych do Twojego kręgu.

## Usuwanie członka kręgu

1. Aby usunąć członka lub zaproszenie, wybierz nazwę członka kręgu na liście Członkowie lub liście Wyślano zaproszenia na ekranie **MÓJ KRĄG**.

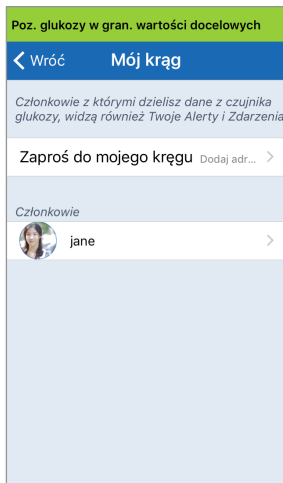

2. Wybierz przycisk **Usuń**, aby usunąć członka z kręgu. Po wyświetleniu monitu wybierz przycisk **Tak**.

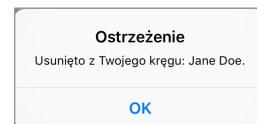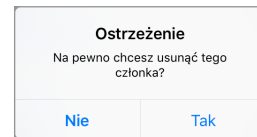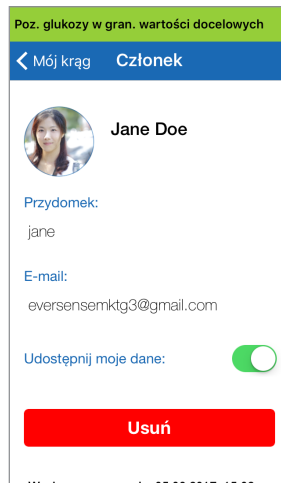


Członek, który został usunięty, otrzyma powiadomienie w swojej aplikacji Eversense NOW.


## Czasowe przerwanie udostępniania danych

Możesz czasowo przerwać udostępnianie danych członkowi Twojego kręgu, nie usuwając go z kręgu.

1. Wybierz nazwę członka na liście **Mój krąg**, aby wyświetlić ekran **CZŁONEK**.

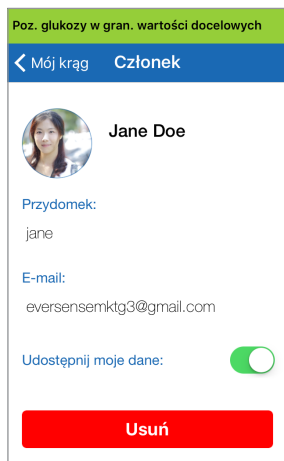

2. Wybierz pozycję **Udostępnij moje dane**, aby włączyć/wyłączyć udostępnianie danych tej osobie.

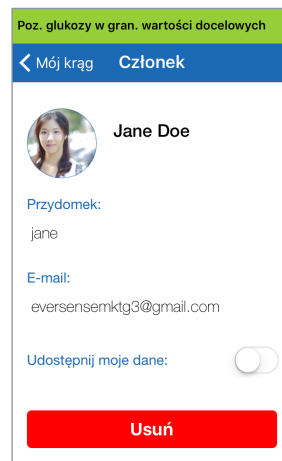

**WAŻNE:** w przypadku wyłączenia funkcji Udostępnij moje dane dla członka kręgu ta osoba nie będzie miała dostępu do żadnych danych glukozy z systemu Eversense XL CGM, alertów i historii zdarzeń. Po wyłączeniu funkcji Udostępnij moje dane członkowie kręgu będą widzieć Twój status w aplikacji Eversense NOW jako Offline. Wyświetlenie zmiany w aplikacji Eversense NOW użytkownika może zająć do 10 minut.

**Uwaga:** użytkownik Eversense NOW może też usunąć Ciebie ze swojej aplikacji. Wyświetlenie zmiany w Twojej aplikacji Eversense XL CGM może potrwać do 2 h.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o aplikacji Eversense NOW odwiedź stronę internetową <https://global.eversensediatetes.com/> lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.




# 16. Informacje o czujniku

*Rozdział opisuje czujnik Eversense XL i metodę jego wszczepiania przez pracownika służby zdrowia.*

Czujnik Eversense XL to zminiaturyzowany fluorymetr, który wykorzystuje intensywność fluorescencji do pomiaru poziomu glukozy w płynie tkankowym. Czujnik jest wszczepiany pod skórę, na ramieniu, tak aby żadna jego część nie wystawała ponad skórę. Czujnik pozostaje na miejscu przez cały okres eksploatacji, dostarczając danych CGM.

Czujnik umieszczony jest w biogodnym materiale i wykorzystuje unikalny polimer fluorescencyjny wykrywający glukozę. Wbudowana w czujnik dioda wzbudza polimer, który szybko sygnalizuje zmiany stężenia glukozy przez zmianę ilości wysyłanego światła. Wyniki pomiaru są następnie przekazywane do inteligentnego nadajnika. Pomiary są wykonywane automatycznie i nie wymagają żadnych działań użytkownika.

Czujnik ma wymiary 3,5 mm x 18,3 mm i jest wyposażony w silikonowy pierścień z niewielką ilością octanu deksametazonu, który jest lekiem sterydowym o działaniu przeciwzapalnym. Ogranicza on reakcję zapalną, bardzo zbliżoną do tej, którą wywołują powszechnie stosowane urządzenia medyczne, takie jak stymulatory pracy serca.

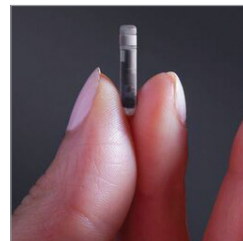

Czujnik Eversense XL

## Etapy wszczepiania

Pracownik służby zdrowia objaśni użytkownikowi systemu i wykona wszystkie (proste i łatwe) kroki zabiegu wszczepiania czujnika. Zabieg wszczepiania, podczas którego użytkownik systemu zachowuje pełną przytomność, zajmuje około 5 minut.

### Miejsce wszczepienia:

Należy wybrać miejsce wprowadzenia wygodne do noszenia czujnika wraz z inteligentnym nadajnikiem przez okres maksymalnie 180 dni. Zalecane miejsce wszczepienia to tylna część ramienia. Umieszczenie czujnika i nadajnika w tym miejscu obniża ryzyko uderzenia nadajnika o drzwi, ścianę lub w wąskich przejściach. W miarę możliwości należy unikać miejsc, w których skóra jest luźna, miejsc z ranami lub tatuażami oraz miejsc z dużą liczbą naczyń krwionośnych, które mogłyby zostać przecięte w czasie wszczepiania. Zaleca się, aby kolejne wszczepienia czujnika przeprowadzać, zmieniając ramię.

**Krok 1: Przygotowanie miejsca wszczepienia** — miejsce wszczepienia należy umyć i zdezynfekować oraz znieczulić miejscowo lidokainą.

**Krok 2: Nacięcie** — w miejscu wszczepienia należy wykonać niewielkie nacięcie (krótsze niż 1 centymetr).

**Krok 3: Wszczepienie czujnika** — należy utworzyć kieszonkę podskórną, do której zostanie wprowadzony czujnik.

**Krok 4: Zamykanie** — nacięcie należy zamknąć opatrunkiem Steri-Strips™. Zazwyczaj szwy nie są wymagane.

**Krok 5: Połączenie czujnika z inteligentnym nadajnikiem** — czujnik należy połączyć z inteligentnym nadajnikiem w celu rozpoczęcia 24-godzinnej fazy nagrzewania.

**Uwaga: czujnik i inteligentny nadajnik należy połączyć po wszczepieniu, a następnie pozostawić miejsce wszczepienia do wygojenia na 24 godziny. Po upływie tego czasu umieścić inteligentny nadajnik na ramieniu.**

Czujnik wymaga 24-godzinnej fazy stabilizacji w miejscu wszczepienia, zwanego fazą nagrzewania. Po upływie 24 godzin od wszczepienia czujnika należy nad nim umieścić inteligentny nadajnik i upewnić się, że oba urządzenia są połączone. (Zob. *Mocowanie inteligentnego nadajnika nad wszczepionym czujnikiem*). Następnie należy przeprowadzić kalibrację fazy inicjalizacyjnej, za pomocą glukometru, wykonując 4 pomiary krwi pobrane z opuszka palca.

## Etapy wyjmowania

Podobnie jak w przypadku zabiegu wszczepiania, pracownik służby zdrowia objaśni proste i szybkie kroki zabiegu usuwania czujnika. Podczas tego zabiegu usuwania trwającego (ok.) 5 minut pacjent zachowuje pełną przytomność.

**Krok 1: Przygotowanie miejsca wszczepienia** — miejsce wszczepienia czujnika należy umyć i zdezynfekować oraz znieczulić miejscowo lidokainą.

**Krok 2: Nacięcie** — w miejscu wszczepienia czujnika należy wykonać niewielkie nacięcie (krótsze niż 1 centymetr).

**Krok 3: Wyjmowanie czujnika** — czujnik należy wyjąć spod skóry i zutylizować.

**Krok 4: Zamykanie rany** — po wyjęciu czujnika nacięcie należy zamknąć przy użyciu sterylnych pasków do zamykania ran Steri-Strips™ (w zależności od preferencji można użyć szwów).

# 17. Podróże

---

*Rozdział opisuje zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie podróży z czujnikiem i nadajnikiem Eversense XL CGM.*

Można bezpiecznie przechodzić przez bramki na lotnisku z założonym czujnikiem i nadajnikiem. Należy poinformować personel kontroli bezpieczeństwa o wszczepionym czujniku i założonym na ramieniu inteligentnym nadajniku.

Inteligentny nadajnik wykonuje automatyczną synchronizację daty i godziny z urządzeniem przenośnym po zmianie strefy czasowej.

Można bezpiecznie korzystać z systemu Eversense XL CGM w samolotach linii lotniczych USA. Inteligentny nadajnik Eversense XL to przenośne urządzenie medyczne (M-PED), którego poziomy emisji spełniają wymagania FAA dotyczące wszystkich trybów pracy w czasie lotu. (Zob. FAA Advisory, okólnik nr 21-16G, z dnia 22.06.2011 r.). Aby używać systemu, należy ustawić tryb offline w urządzeniu przenośnym, a następnie włączyć funkcję Bluetooth. W przypadku lotów poza USA należy stosować się do lokalnych przepisów bezpieczeństwa dotyczących używania urządzeń medycznych w czasie lotu.

**WAŻNE:** podróżując do innych stref czasowych, należy dostosować ustawienia przypomnień o zaplanowanych godzinach kalibracji do aktualnej strefy czasowej.

# 18. Rozwiązywanie problemów

*Rozdział opisuje rozwiązywanie problemów z systemem Eversense XL CGM oraz zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.*

## Inteligentny nadajnik

**P.: W jaki sposób mogę wyłączyć inteligentny nadajnik?**

Odp.: Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania nadajnika przez 5 sekund. Zwolnij przycisk, gdy nadajnik zawibruje.

**P.: W jaki sposób mogę włączyć inteligentny nadajnik?**

Odp.: Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania nadajnika przez 5 sekund. Zwolnij przycisk, gdy nadajnik zawibruje.

**P.: W jaki sposób prawidłowo umieścić inteligentny nadajnik nad czujnikiem?**

Odp.: Istnieją dwie metody zapewniające prawidłowe umieszczenie nadajnika:

1. W przypadku korzystania z przylepca do mocowania nadajnika upewnij się, że symbol przycisku zasilania i kontrolka LED są ustawione równolegle do ramienia.

2. Użyj ekranu **PRZEWODNIK**

**UMIESZCZANIA**, aby się upewnić, że czujnik i inteligentny nadajnik zostały połączone.

- Wybierz opcję **Przewodnik umieszczania**.
- Umieść inteligentny nadajnik nad czujnikiem, aby potwierdzić połączenie.

**P.: Inteligentny nadajnik nie wibruje. Dlaczego?**

Odp.: Jeżeli inteligentny nadajnik nie wibruje, wypróbuj poniższe rozwiązania:

- Sprawdź, czy inteligentny nadajnik jest połączony z urządzeniem przenośnym.
- Sprawdź, czy funkcja **Nie przeszkadzać** nie jest wyłączona, wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Ustawienia dźwięku**.
- Sprawdź, czy bateria nadajnika ma wystarczającą ilość energii, i naładuj ją w razie potrzeby.

Jeżeli inteligentny nadajnik w dalszym ciągu nie wibruje, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub lokalnym dystrybutorem.

**P.: Czy mogę używać tego samego przylepca częściej niż raz dziennie?**

Odp.: Za każdym razem, kiedy inteligentny nadajnik jest umieszczany nad czujnikiem, należy zastosować nowy pasek samoprzylepny. Każdego przylepca należy używać przez 24 godziny.

**P.: Jaki jest numer seryjny i numer modelu nadajnika?**

Odp.: Numer seryjny i numer modelu nadajnika można znaleźć na tylnej ściance nadajnika. Po sparowaniu inteligentnego nadajnika z urządzeniem przenośnym numer seryjny i numer modelu znajduje się w aplikacji, wybierz opcję **Menu > Informacje > Mój nadajnik**.

**P.: W jaki sposób mogę zmienić nazwę nadajnika?**

Odp.: Wybierz opcję **Menu > Ustawienia > System > Nazwa nadajnika**. Wpisz żadaną nazwę. Zaktualizowana nazwa nadajnika pojawi się na ekranie stanu połączenia.

**P.: Dlaczego kontrolka nadajnika świeci się stale na pomarańczowo?**

Odp.: Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Upewnij się, że nadajnik jest sparowany z urządzeniem przenośnym.
2. Upewnij się, że bateria nadajnika jest naładowana.

3. Sprawdź alerty i powiadomienia w aplikacji.

4. Zdejmij nadajnik z ramienia i poczekaj kilka minut. Pojawi się komunikat **Nie wykryto czujnika**, a nadajnik będzie wibrował częściej, wyszukując czujnik. Jeżeli nadajnik nie wibruje lub jeżeli aplikacja nie pokazuje komunikatu **Nie wykryto czujnika**, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Umieść inteligentny nadajnik z powrotem nad czujnikiem, aby sprawdzić, czy pomarańczowa kontrolka zgaśnie, obserwuj powiadomienia w aplikacji.

Jeżeli pomarańczowa kontrolka świeci dalej, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

## **Bateria inteligentnego nadajnika i jej ładowanie**

**P.: Jak długo działa w pełni naładowana bateria?**

Odp.: W pełni naładowana bateria inteligentnego nadajnika działa przez około 24 do 36 godzin.

**P.: Jak długo trwa naładowanie baterii inteligentnego nadajnika?**

Odp.: Całkowite naładowanie baterii trwa 15 minut od momentu podłączenia kabla do gniazda ściennego. W przypadku ładowania z portu USB komputera lub jeśli bateria jest całkowicie rozładowana może to potrwać dłużej.

**P.: Co się stanie po całkowitym rozładowaniu baterii nadajnika?**

Odp.: Nie będą wyświetlane odczyty poziomu glukozy.  
Po stwierdzeniu rozładowania baterii należy natychmiast rozpocząć jej ładowanie.

**P.: Jak mogę sprawdzić stan baterii nadajnika?**

Odp.: Istnieją trzy sposoby sprawdzania stanu baterii nadajnika:

1. Wybierz opcje **Menu > Informacje > Mój nadajnik**. Przewiń ekran w dół, do wiersza Poziom naładowania baterii, który pokazuje ilość energii pozostałą w baterii.
2. Sprawdź ikonę baterii w prawym górnym rogu ekranu **MOJA GLUKOZA**. Czerwona ikona baterii wskazuje, że poziom naładowania baterii jest niski.
3. Włącz inteligentny nadajnik. Wciśnij i zwolnij przycisk zasilania nadajnika. Pomarańczowa kontrolka wskazuje na niski poziom naładowania baterii nadajnika. Zielona kontrolka wskazuje, że w baterii pozostało przynajmniej 10% energii.

**P.: Na ekranie Informacje > Mój nadajnik wskaźnik poziomu naładowania baterii pokazuje 65%, a następnie 35%. Dlaczego tak się dzieje?**

Odp.: Szybkość rozładowywania baterii różni się w zależności od stylu jego użytkowania; taka sama bateria będzie się rozładowywała inaczej w dwóch różnych urządzeniach. Dlatego też wskaźniki poziomu naładowania opisane są z dużymi przyrostami: 100%, 65%, 35%, 10% i 0%. Z naszych badań wynika, że alert „Niski poziom baterii” jest wyzwalany niezmiennie w punkcie, w którym pozostała ilość energii pozwala na ok. 2 godziny pracy nadajnika (ok. 10%). Po otrzymaniu alertu „Niski poziom baterii” należy niezwłocznie rozpocząć ładowanie.

## **Łączenie z inteligentnym nadajnikiem**

**P.: W jaki sposób mogę po raz pierwszy sparować urządzenie przenośne z inteligentnym nadajnikiem?**

Odp.: Aby sparować urządzenie przenośne z nadajnikiem, postępuj zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje zamieszczono w niniejszej instrukcji użytkownika.

1. Uruchom aplikację Eversense.
2. Wciśnij trzykrotnie przycisk włączania zasilania inteligentnego nadajnika, aby przejść do trybu „Widoczny”.
3. Podczas gdy kontrolka nadajnika miga na pomarańczowo i zielono, dotknij identyfikatora nadajnika na ekranie **POŁĄCZ**. Aplikacja rozpocznie proces wyszukiwania.
  - Identyfikator inteligentnego nadajnika jest identyczny z numerem seryjnym na jego tylnej ścianie.
4. Po wykryciu przez aplikację inteligentnego nadajnika pojawi się ekran wyskakujący **ŻĄDANIE PAROWANIA BLUETOOTH**.
5. Wybierz opcję **Paruj**, aby potwierdzić parowanie.
6. Po zakończeniu parowania obok identyfikatora inteligentnego nadajnika pojawi się komunikat **Połączono**.

**P.: Mam wrażenie, że inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne nie zostały połączone.**

Odp.: Brak połączenia może wynikać z wielu przyczyn.

- Upewnij się, że funkcja Bluetooth w urządzeniu przenośnym jest włączona oraz że nazwa lub numer seryjny inteligentnego nadajnika pojawiły się na liście urządzeń.

- Taki stan może być tylko przejściowy. Wybierz opcję **Menu > Połącz**. Jeżeli przy nazwie nadajnika jest wyświetlany komunikat **Rozłączony**, dotknij nadajnika, aby nawiązać połączenie ręcznie.
- Nadajnik może być poza zasięgiem połączenia bezprzewodowego urządzenia przenośnego. Przesuń urządzenie przenośne bliżej nadajnika.
- Inteligentny nadajnik może być wyłączony, a jego bateria może być rozładowana lub właśnie się ładować. Może wystąpić konieczność ponownego włączenia funkcji Bluetooth (BLE) inteligentnego nadajnika przez wykonanie poniższych czynności.
  1. Wyłącz inteligentny nadajnik — wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund i poczekaj, aż wyłączenie nadajnika zostanie potwierdzone przez wibrację.
  2. Aby ponownie włączyć funkcję BLE, poczekaj 2 sekundy i wciśnij trzykrotnie przycisk zasilania.  
**(Uwaga: podczas ponownego włączania funkcji BLE nie wolno usuwać sparowanego urządzenia / zapominać go w ustawieniach Bluetooth urządzenia przenośnego).**



3. Ponownie wciśnij trzykrotnie przycisk włączania zasilania inteligentnego nadajnika, aby ustawić go w trybie „Widoczny” i sparować z urządzeniem przenośnym. Wybierz opcję **Menu > Połącz**, aby sprawdzić, czy inteligentny nadajnik jest połączony. W przypadku braku połączenia dotknij nazwy inteligentnego nadajnika na liście.

Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, można przejść do ustawień Bluetooth urządzenia mobilnego i anulować parowanie lub zapomnieć nadajnik, a następnie trzykrotnie wcisnąć przycisk zasilania w celu sparowania urządzenia. Jeżeli problem się powtarza, może wystąpić konieczność zrestartowania nadajnika.

**P.: W jaki sposób mogę zrestartować inteligentny nadajnik?**

Odp.: Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Umieść inteligentny nadajnik w stacji dokującej i podłącz kabel USB. Podłącz kabel do gniazdka ściennego (można również podłączyć standardową końcówkę USB kabla bezpośrednio do portu USB komputera).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilkanaście sekund (ok. 14 sekund) na inteligentnym nadajniku po podłączeniu kabla USB. Następnie zwolnij przycisk zasilania.

3. Kontrolka LED zacznie migać po około dwóch sekundach, informując, że inteligentny nadajnik wykonuje sekwencję automatycznego testu. Kontrolka LED będzie migać w różnych kolorach. Po zakończeniu automatycznego testu inteligentny nadajnik zawibruje, a kontrolka LED zaświeci się stałym zielonym lub pomarańczowym światłem.
4. Jeśli automatyczny test nie zostanie zakończony, powtórz czynności opisane w punktach 1–3.
5. Jeśli czynności opisane w punkcie 3 zostaną pomyślnie zakończone, inteligentny nadajnik będzie gotowy do użycia.
6. Odłącz inteligentny nadajnik od kabla USB i kontynuuj procedurę parowania. Po połączeniu system przejdzie w fazę inicjalizacji. Jeśli nie można ukończyć resetowania, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

**P.: Czy ktoś inny może podłączyć się do mojego nadajnika?**

Odp.: System Eversense XL CGM wykorzystuje bezpieczne połączenie Bluetooth i nie umożliwia połączenia innej osobie.

**P.: Co się stanie, gdy inteligentny nadajnik zostanie odłączony od urządzenia przenośnego lub aplikacji?**

Odp.: Inteligentny nadajnik będzie wibrował, zaś aplikacja co 30 minut, będzie wyświetlała powiadomienie do momentu jej wyłączenia lub ponownego podłączenia nadajnika. Po ponownym nawiązaniu połączenia pobrane dane zostaną zsynchronizowane z aplikacją mobilną.

**P.: Dlaczego nie mogę połączyć urządzenia przenośnego z inteligentnym nadajnikiem (na pasku stanu jest wyświetlany komunikat „Brak połączonego nadajnika”)?**

Odp.: Inteligentny Nadajnik może nie łączyć się z urządzeniem przenośnym z poniższych powodów:

- Trwa ładowanie inteligentnego nadajnika.
- Inteligentny nadajnik jest wyłączony.
- Bateria nadajnika jest całkowicie rozładowana.
- Funkcja Bluetooth w urządzeniu przenośnym jest wyłączona.
- Inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne nie zostały sparowane lub zostały rozparowane. Należy sparować oba urządzenia. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Rozwiązywanie problemów*.

**P.: Dlaczego na ekranie POŁĄCZ jest wyświetlany komunikat Wyszukiwanie?**

Odp.: Aplikacja pokazuje komunikat **Wyszukiwanie** z jednego z poniższych powodów:

- Trwa ładowanie inteligentnego nadajnika.
- Inteligentny nadajnik jest wyłączony.
- Bateria nadajnika jest całkowicie rozładowana.
- Funkcja Bluetooth w urządzeniu przenośnym jest wyłączona.
- Inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne nie zostały sparowane, lub zostały rozparowane. Należy sparować oba urządzenia.

**P.: Na czym polega tryb „Widoczny” (parowania)?**

Odp.: Tryb „Widoczny” to taki tryb pracy inteligentnego nadajnika, w którym może on zostać wykryty przez urządzenie przenośne (jest dla niego „widoczny”) na potrzeby parowania. Więcej informacji znajduje się w rozdziale *Rozpoczynanie pracy*.

**P.: Dlaczego na ekranie **POŁĄCZ** są wyświetlane inne inteligentne nadajniki?**

Odp.: Jeżeli w pobliżu są inni użytkownicy systemu Eversense CGM, aplikacja może znaleźć te urządzenia. Aplikacja połączy się jednak tylko z inteligentnym nadajnikiem, który został sparowany z urządzeniem przenośnym. **NIE WOLNO** podejmować próby parowania z innymi nadajnikami.

**P.: Mój inteligentny nadajnik nie jest wymieniony na stronie **POŁĄCZ**.**

Odp.: Inteligentny nadajnik nie będzie się pojawiał na ekranie **POŁĄCZ** z jednego z poniższych powodów:

- Trwa ładowanie inteligentnego nadajnika przez kabel USB.
- Inteligentny nadajnik jest wyłączony.
- Bateria nadajnika jest całkowicie rozładowana.
- Funkcja Bluetooth w urządzeniu przenośnym jest wyłączona.
- Inteligentny nadajnik i urządzenie przenośne nie zostały sparowane, lub zostały rozparowane. Należy sparować oba urządzenia.

**P.: Właśnie odebrałem(-am) nowy inteligentny nadajnik. W jaki sposób mogę odłączyć stary nadajnik od czujnika i powiązać czujnik z nowym nadajnikiem?**

Odp.: Wybierz opcję **Połącz** w menu głównym. Dotknij i przytrzymaj nazwę swojego starego nadajnika. Wybierz opcję **OK**, aby zatrzymać proces automatycznego łączenia się ze starym inteligentnym nadajnikiem. Wykonaj procedurę parowania nowego inteligentnego nadajnika z aplikacją oraz powiązania go z czujnikiem, opisane w Instrukcji użytkownika.

## Kalibracja

**P.: Czy wykonywanie więcej niż 2 kalibracji dziennie wpływa na dokładność systemu?**

Odp.: Wykonywanie kalibracji częściej niż 2 razy dziennie nie będzie miało negatywnego wpływu na dokładność systemu.

**P.: Kiedy należy wykonać badanie próbki krwi glukometrem?**

Odp.: Badanie glukometrem należy wykonywać:

- podczas zaplanowanej kalibracji,
- kiedy nie można uzyskać odczytu poziomu glukozy z czujnika,

- po każdym osiągnięciu wartości progowej alertu niskiego lub wysokiego stężenia glukozy,
- po każdym wystąpieniu objawów niskiego lub wysokiego poziomu glukozy,
- kiedy objawy nie są spójne z odczytami poziomu glukozy z czujnika,
- przed podjęciem decyzji o dawkowaniu insuliny lub spożyciu węglowodanów.

### **P.: Dlaczego nie mogę wykonać kalibracji?**

Odp.: Niemożność wykonania kalibracji może wynikać z poniższych przyczyn:

- nie zebrano wystarczającej ilości danych poziomu glukozy z czujnika, co może zająć do 5 minut;
- wartości glukozy z czujnika zmieniają się szybko, np. po posiłku lub po podaniu insuliny;
- wartość odczytu poziomu glukozy jest mniejsza niż 40 mg/dL;
- wartość odczytu glukozy jest większa niż 400 mg/dL;
- wartość poziomu glukozy została zmierzona ponad 10 minut przed jej wprowadzeniem do aplikacji Eversense;
- ostatnia wartość wskazania czujnika różni się znacznie od wprowadzonego wskazania glukometru;
- nie nadeszła pora zaplanowanej kalibracji.

### **P.: Jak mogę zmienić zaplanowane godziny kalibracji porannej i wieczornej?**

Odp.: Wybierz opcję **Menu > Ustawienia >**

**Dzienna kalibracja.** Wybierz, czy chcesz zmienić godzinę kalibracji porannej czy wieczornej. Godziny kalibracji porannej i wieczornej muszą być ustawione w odstępie co najmniej 10 godzin, a maksymalnie 14 godzin.

### **P.: Dlaczego kalibracja została odrzucona?**

Odp.: System może odrzucić kalibrację z z poniższych przyczyn:

- wprowadzona wartość odczytu poziomu glukozy jest mniejsza niż 40 mg/dL,
- wprowadzona wartość odczytu poziomu glukozy jest większa niż 400 mg/dL.
- wprowadzona wartość wskazania czujnika różni się znacznie od ostatniego wskazania czujnika glukozy.

W przypadku odrzucenia kalibrację należy powtórzyć. Ponowna kalibracja będzie możliwa po upływie 60 minut.

**P.: Czy mogę wykonać kalibrację przed zaplanowaną godziną kalibracji?**

Odp.: Można przeprowadzić kalibrację maksymalnie na 2 godziny przed zaplanowaną godziną kalibracji. W przypadku pominięcia zaplanowanej godziny kalibracji system będzie wysyłał przypomnienia co godzinę. W celu przeanalizowania następnych dostępnych godzin kalibracji wybierz opcję **Menu > Kalibruj**. Zostanie wyświetlona godzina następnej zaplanowanej kalibracji.

**P.: Jaką godzinę muszę wprowadzić na ekranie KALIBRUJ, kiedy otrzymam powiadomienie o konieczności przeprowadzenia kalibracji?**

Odp.: Godzinę wykonania badania glukometrem. Wynik musisz wprowadzić w ciągu 10 minut od wykonania badania glukometrem.

**P.: Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje o fazie kalibracji, liczbie kalibracji oraz ostatnim dniu i godzinie kalibracji?**

Odp.: Szczegółowe informacje dotyczące kalibracji można znaleźć, wybierając opcję **Menu > Informacje > Mój nadajnik**.

**P.: Jakie są fazy kalibracji?**

Odp.: W systemie Eversense XL CGM występują dwie fazy kalibracji: faza inicjalizacji i dzienna kalibracja. Faza inicjalizacji rozpoczyna się 24 godziny po wszczepieniu czujnika i wymaga wprowadzenia 4 wyników badania próbek krwi glukometrem w celu skalibrowania urządzenia. Faza dziennej kalibracji następuje po fazie inicjalizacji i wymaga wykonania 2 kalibracji dziennie (rano i wieczorem) przez cały okres użytkowania czujnika.

## Alerty i powiadomienia

**P.: Czy mogę zmienić wzór alertu wibracyjnego generowanego przez nadajnik?**

Odp.: Wzory wibracji inteligentnego nadajnika są stałe i nie można ich zmieniać. Częstotliwość powtarzania niektórych alertów można zmienić, wybierając opcję **Ustawienia > Ustawienia dźwięku**.

**P.: Czy mogę zwiększyć natężenie dźwięków generowanych przez aplikację na urządzeniu przenośnym?**

Odp.: Możesz zwiększyć natężenie dźwięków aplikacji na urządzeniu przenośnym, podłączając je do zewnętrznego wzmacniacza.

**P.: Jak wyciszyć alerty poziomu glukozy?**

Odp.: Alerty poziomu glukozy można wyciszyć, potwierdzając je na urządzeniu przenośnym i podejmując wymagane działania.

**P.: Czy mogę zmienić liczbę odbieranych alertów?**

Odp.: Jeżeli uznasz, że otrzymujesz zbyt wiele alertów, musisz najpierw ustalić z pracownikiem służby zdrowia, jakie ustawienia alertów będą najbardziej wskazane. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia alertów poziomu glukozy, wybierz opcję **Menu > Ustawienia > Poziom glukozy**.

**P.: Jaka jest różnica między alertem i powiadomieniem?**

Odp.: Powiadomienie to komunikat niekrytyczny, o niskim priorytecie (np. przypomnienie o kalibracji). Alert to ważny komunikat, na który należy zwrócić uwagę i zareagować lub ewentualnie wykonać zalecane czynności.

**P.: Czym są alerty o tempie zmian?**

Odp.: Alerty o tempie zmian informują, że poziom glukozy rośnie lub spada szybciej, niż zezwala na to wartość wprowadzona na ekranie **Ustawienia > Poziom glukozy**. Należy

wtedy niezwłocznie wykonać test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszka palca w celu potwierdzenia wartości.

**P.: Co się dzieje z powiadomieniami, kiedy aplikacja zostanie odłączona od nadajnika?**

Odp.: Jeżeli aplikacja zostanie odłączona od nadajnika ale bez zdejmowania nadajnika z ramienia, alerty odbierane w tym czasie będą przesyłane do aplikacji po jej ponownym podłączeniu i zsynchronizowaniu z nadajnikiem.

**P.: Dlaczego nie mogę zobaczyć powiadomień, kiedy aplikacja pracuje w tle?**

Odp.: Sprawdź w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego, w jaki sposób włączyć powiadomienia w tle.

**P.: W jaki sposób mogę posortować powiadomienia na ekranie HISTORIA ALERTÓW?**

Odp.: W górnej części ekranu **HISTORIA ALERTÓW** znajduje się filtr sortowania. Możesz sortować alerty wg ich znaczenia (żółty i niebieski) oraz wg typu. Wybierz odpowiednią ikonę filtra.

## **P.: Czym są alerty przewidywania?**

Odp.: Alerty przewidywania informują z wyprzedzeniem o zdarzeniu, które prawdopodobnie wystąpi, jeśli obecne trendy zostaną utrzymane. Alerty przewidywania wykorzystują wartości graniczne wysokiego i niskiego poziomu glukozy, ustalane w celu określenia, kiedy mają być generowane alerty przewidywania. Alerty można ustawić z 10-, 20- lub 30-minutowym wyprzedzeniem przed przewidzianym przez system CGM osiągnięciem ustawionych poziomów alertów. Inteligentny nadajnik zacznie wibrować, a aplikacja wyemituje alert dźwiękowy i wyświetli komunikat na ekranie **MOJA GLUKOZA**, informując o przewidywanym wysokim lub niskim poziomie glukozy. Należy wtedy niezwłocznie wykonać test glukometrem przy użyciu próbki krwi pobranej z opuszka palca w celu potwierdzenia wartości.

## **P.: Jak wyciszyć alerty poziomu glukozy?**

Odp.: Alerty poziomu glukozy można wyciszyć, potwierdzając je na urządzeniu przenośnym i podejmując wymagane działania.

## **Odczyty poziomu glukozy**

### **P.: Dlaczego odczyt z czujnika różni się od odczytu z glukometru?**

Odp.: System CGM dokonuje pomiaru glukozy w płynie tkankowym (ISF) wypełniającym przestrzeń między komórkami ciała. Fizjologiczne różnice pomiędzy ISF i krwią pobraną z opuszka mogą być powodem różnic w pomiarach glukozy. Różnice te są szczególnie widoczne w czasie gwałtownych zmian stężenia glukozy (np. po posiłku, po podaniu insuliny czy w trakcie ćwiczeń). Wartości stężenia glukozy w ISF zmieniają się z kilkuminutowym opóźnieniem w stosunku do wartości stężenia glukozy we krwi.

### **P.: Aplikacja wyświetla „-- -- --” zamiast odczytu poziomu glukozy.**

Odp.: Taka sytuacja może wystąpić w przypadku braku połączenia między inteligentnym nadajnikiem i urządzeniem przenośnym.

Może to również mieć miejsce, gdy został aktywowany jeden z poniższych alertów:

- nie wykryto czujnika,
- odczyt z czujnika wykraczający poza górny lub dolny zakres,
- niska temperatura czujnika,

- dużo światła w otoczeniu,
- kontrola czujnika,
- wysoka temperatura inteligentnego nadajnika,
- wysoka temperatura czujnika,
- bateria rozładowana,
- minął termin wymaganej kalibracji,
- wykryto nowy czujnik,
- wymiana czujnika,
- kalibracja przeterminowana,
- błąd inteligentnego nadajnika,
- alert wstrzymania czujnika.

Aby skasować alert, należy wykonać polecenia wymienione w komunikacie powiadomienia.

## Strzałki trendu

**P.: Strzałki trendu i alerty poziomu glukozy nie są zgodne.**

Odp.: Strzałki trendu wskazują tempo i kierunek zmian poziomu glukozy. Na przykład strzałka trendu może być skierowana do góry lub do dołu (wskazując wolne lub szybkie tempo zmian). Alerty poziomu glukozy informują o osiągnięciu ustawionej wartości alertu poziomu glukozy, niezależnie od tempa i kierunku zmiany.

**P.: Strzałka trendu jest szara, a nie niebieska.**

Odp.: Do obliczania i wyświetlania trendów system CGM wykorzystuje **dane z pomiaru ciągłego z ostatnich 20 minut**. W przypadku braku wystarczającej liczby wartości wskazań czujnika do obliczeń strzałka jest wyświetlana w kolorze szarym.

## Aplikacja

**P.: Co się stanie gdy przeinstaluję aplikację?**

Odp.: Po przeinstalowaniu aplikacja pobierze dane historyczne tylko z ostatnich 3 dni.

**P.: Jak sprawdzić wersję aplikacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym?**

Odp.: Numer wersji aplikacji można znaleźć, wybierając opcję **Menu > Informacje > Informacje produkcyjne**.

**P.: W jaki sposób aplikacja będzie aktualizowana?**

Odp.: Instrukcja aktualizacji aplikacji znajduje się na stronie <https://global.eversenseddiabetes.com/>.

**P.: Z jakimi urządzeniami aplikacja Eversense XL jest zgodna?**

Odp.: Listę zgodnych urządzeń można znaleźć na stronie <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.



**P.: Czy mogę używać tego samego nadajnika po zmianie urządzenia przenośnego?**

Odp.: Konieczne będzie zainstalowanie aplikacji na nowym urządzeniu przenośnym i sparowanie urządzenia przenośnego z inteligentnym nadajnikiem. Aplikacja na nowym urządzeniu mobilnym zsynchronizuje dane historyczne tylko z ostatnich 3 dni.

**P.: Czy mogę usunąć swoje konto Eversense?**

Odp.: Jeśli usuniesz swoje konto, czynność ta jest trwała. Utracisz dostęp do swoich danych CGM w aplikacji mobilnej Eversense oraz na koncie Eversense DMS. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej Eversense NOW, nie będziesz już mógł zdalnie przeglądać CGM Eversense. Nie możesz użyć tego samego adresu e-mail do utworzenia nowego konta. Aby zainicjować proces usuwania konta, naciśnij opcję **Usuń konto** na stronie logowania.

**P.: Na czym polega funkcja Nie przeszkadzać?**

Odp.: Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać w aplikacji Eversense XL aplikacja mobilna przestanie wyświetlać alerty niekrytyczne. Inteligentny nadajnik przestanie również przysyłać powiadomienia wibracyjne dotyczące alertów

niekrytycznych. Alerty krytyczne będą w dalszym ciągu dostarczane za pośrednictwem nadajnika inteligentnego i aplikacji mobilnej.

Funkcja Nie przeszkadzać w smartfonie ma priorytet nad funkcją Nie przeszkadzać w aplikacji. Dlatego też jeśli w smartfonie włączono funkcję Nie przeszkadzać, nie będziesz odbierać alertów nadajnika w aplikacji. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą automatycznie uruchamiać tryb Nie przeszkadzać w Twoim telefonie. Należy pamiętać, że niektóre aplikacje mogą automatycznie włączać w telefonie tryb „Nie przeszkadzać”.

**P.: Dlaczego na pasku stanu wyświetlany jest komunikat „Synchronizacja”?**

Odp.: Komunikat „Synchronizacja” pojawi się na pasku stanu, gdy aplikacja na urządzeniu przenośnym zostanie połączona z inteligentnym nadajnikiem.

## Czujnik

**P.: Czy czujnik można wszczepić w inną część ciała niż ramię?**

Odp.: Podczas badań klinicznych system Eversense XL CGM testowano tylko na ramieniu.

### P.: Kiedy muszę wymienić czujnik?

Odp.: System będzie dostarczać odczyty poziomu glukozy przez cały czas eksploatacji czujnika, który może trwać maksymalnie 180 dni. Będziesz otrzymywać okresowe przypomnienia o terminie wymiany czujnika (na 30, 14, 7, 3, 2 i na 1 dzień przed terminem wymiany). Skontaktuj się z lekarzem w celu zaplanowania wymiany czujnika.

### P.: Gdzie mogę znaleźć numer seryjny czujnika?

Odp.: Szczegółowe informacje dotyczące numeru seryjnego czujnika można znaleźć, wybierając opcję **Menu > Informacje > Mój czujnik**.

### P.: Właśnie udało mi się po raz pierwszy połączyć czujnik z nadajnikiem, ale po dotknięciu pozycji **Informacje > Mój czujnik data i/lub godzina wszczepienia czujnika nie są wyświetlane**.

Odp.: Cały proces łączenia może zająć maksymalnie 10 minut. Upewnij się, że nadajnik znajduje się nad czujnikiem. Potwierdź, że na ekranie **POŁĄCZONY CZUJNIK** jest wyświetlany symbol zaznaczenia, oznaczający zakończenie procesu łączenia. Przejdź do ekranu **MOJA GLUKOZA** i poczekaj około 2 minut. Wróć do ekranu **MÓJ CZUJNIK**. Jeżeli prawidłowe informacje o dacie i godzinie wszczepienia

czujnika nie są w dalszym ciągu wyświetlane, wykonaj poniższe czynności:

1. Zdejmij nadajnik z ramienia. Podłącz kabel ładowania do nadajnika i źródła zasilania. Podłącz wtyczkę do gniazda ściennego, a następnie wyciągnij wtyczkę i odłącz kabel od nadajnika.
2. Umieść inteligentny nadajnik ponownie nad czujnikiem. Przejdź do ekranu **Informacje > Mój czujnik** i potwierdź prawidłowość daty oraz godziny wszczepienia. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

### P.: Dlaczego widzę powiadomienie „Wykryto nowy czujnik”?

Odp.: Komunikat ten pojawia się wtedy, gdy inteligentny nadajnik wykryje nowy czujnik, umożliwiając połączenie go z nadajnikiem. Inteligentny nadajnik można jednocześnie powiązać wyłącznie z jednym czujnikiem. Jeżeli masz już wszczepiony czujnik połączony z nadajnikiem i widzisz komunikat **Wykryto nowy czujnik**, wybierz opcję **Nie teraz**. W razie wątpliwości skontaktuj się z działem obsługi klienta.

**P: Pomimo że powiązałem(-am) czujnik z nadajnikiem, ekran Informacje > Mój nadajnik nie wyświetla bieżącej fazy działania.**

Odp.: Cały proces łączenia może zająć maksymalnie 10 minut. Upewnij się, że nadajnik znajduje się nad czujnikiem. Potwierdź, że na ekranie **POŁĄCZONY CZUJNIK** wyświetlany jest symbol zaznaczenia, oznaczający zakończenie procesu łączenia. Przejdź do ekranu **MOJA GLUKOZA** i poczekaj około 2 minut. Wróć od ekranu **MÓJ CZUJNIK**. Jeśli bieżąca faza w dalszym ciągu nie jest wyświetlana, wykonaj poniższe czynności:

1. Zdejmij nadajnik z ramienia.
2. Podłącz kabel ładowania do nadajnika i źródła zasilania.
3. Podłącz wtyczkę do gniazda ściennego, a następnie wyciągnij wtyczkę i odłącz kabel od nadajnika.
4. Umieść nadajnik z powrotem nad czujnikiem.
5. Przejdź do ekranu **Informacje > Mój nadajnik** i potwierdź prawidłowość bieżącej fazy. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

**P.: Dlaczego system CGM wrócił do fazy inicjalizacji?**

Odp.: System wraca do fazy inicjalizacji z jednej z poniższych przyczyn:

- okres kalibracji wygaśł przed wprowadzeniem odczytu z glukometru,
- wystąpiły znaczące różnice między 3 lub więcej odczytami poziomu glukozy z glukometru i bieżącym odczytem poziomu glukozy z czujnika,
- bateria inteligentnego nadajnika nie została naładowana w ciągu 16 godzin od otrzymania alertu o niskim poziomie naładowania,
- w przypadku ręcznej zmiany godziny na urządzeniu przenośnym inteligentny nadajnik zsynchronizuje się i ponownie zainicjuje połączenie z urządzeniem przenośnym.

**P.: Czy technik MRI może nosić system Eversense CGM?**

Odp.: Tak. Czujnik i inteligentny nadajnik Eversense są przeciwwskazane dla osób poddawanych badaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

## Zdarzenia

**P.: W jaki sposób mogę posortować zdarzenia na ekranie DZIENNIK ZDARZEŃ?**

Odp.: W górnej części ekranu **DZIENNIK ZDARZEŃ** znajduje się filtr sortowania. Wybierz ikonę filtra, aby wyświetlić wybrane rodzaje zdarzeń. Domyślnie są wyświetlane wszystkie zdarzenia.

## Synchronizacja

**P.: Dlaczego czasami w górnej części ekranu widzę niebieski i biały pasek postępu?**

Odp.: Pasek postępu synchronizacji może być wyświetlany z wielu przyczyn.

- Inteligentny nadajnik był przez jakiś czas poza zasięgiem czujnika i teraz ponownie synchronizuje dane.
- Zamknęto aplikację Eversense i uruchomiono ją ponownie.
- Bateria urządzenia przenośnego rozładowała się i była ładowana.
- Dane wczytano na konto Eversense DMS.

## Skróty

**P.: Czy istnieje jakiś sposób na wybranie danych wyświetlanych na ekranie MOJA GLUKOZA zamiast przewijania wstecz?**

Odp.: Tak. Dotknij paska „Dzisiaj” nad wykresem. Pojawi się okno wyskakujące, umożliwiające wybranie danych wyświetlanych na wykresie.

**P.: Kiedy przeglądam dane historyczne dla określonej daty/godziny na ekranie MOJA GLUKOZA, czy mogę skorzystać ze skrótu, aby przejść do bieżącej daty i godziny?**

Odp.: Tak. Aby wrócić do bieżącej daty i godziny, dotknij wartość glukozy lub strzałki trendu na ekranie **MOJA GLUKOZA**.

**P.: Czy istnieje skrót do ekranu HISTORIA ALERTÓW?**

Odp.: Jeżeli inteligentny nadajnik jest połączony z aplikacją, można dotknąć paska stanu w górnej części ekranu i wyświetlić ekran **HISTORIA ALERTÓW**.

**P.: Czy istnieje skrót do ekranu POŁĄCZ?**

Odp.: Jeżeli inteligentny nadajnik jest odłączony od aplikacji, po dotknięciu paska stanu w górnej części ekranu jest wyświetlany ekran **POŁĄCZ**.

**P.: Czy istnieje skrót do wprowadzania zdarzeń, takich jak posiłki lub ćwiczenie?**

Odp.: Na ekranie **MOJA GLUKOZA** dotknij wykresu, aby wyświetlić ekran **DODAJ ZDARZENIE**.

# 19. Działanie systemu

*Rozdział zawiera dane na temat działania systemu.*

## **Parametry pracy systemu w trakcie badania klinicznego oraz Informacje ogólne**

Bezpieczeństwo stosowania oraz skuteczność systemu Eversense CGM zostały ocenione w szeregu prospektywnych badaniach wykonalności oraz badań kluczowych. W Europie i Stanach Zjednoczonych przeprowadzono trzy główne badania kluczowe: PRECISE, PRECISE II i PRECISION. W tych badaniach oceniano działanie systemu Eversense CGM pod względem bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Oceny dokładności dokonywano w różnych punktach w trakcie badań. Uczestników proszono o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych występujących w czasie trwania badań. Badania PRECISE II oraz PRECISION zostały przeanalizowane przy pomocy nowego zaktualizowanego oprogramowania algorytmu 602.

## **Badanie PRECISE**

Działanie systemu Eversense CGM oceniono w trakcie wieloośrodkowego, nierandomizowanego badania klinicznego. Do badania włączono dorosłych pacjentów cukrzycowych (18 lat i starszych) w 7 różnych ośrodkach w 3 różnych krajach. Każdemu pacjentowi wszczepiono 2 oddzielne czujniki, po jednym na każdym ramieniu. Jeden czujnik służył do wyświetlania danych o poziomie glukozy na urządzeniu przenośnym pacjenta, a drugi do zbierania danych o poziomie glukozy, bez ich wyświetlania. Dwudziestu trzech (23) pacjentów kontrolowano przez 180 dni po wszczepieniu czujnika. Średnie odchylenie bezwzględne (MARD) mierzone przez 180 dni wyniosło 11,1% dla wartości poziomu glukozy ponad 75 mg/dL oraz 11,6% dla wartości poziomu glukozy od 40 do 400 mg/dL.

## Analiza siatki błędów Clarke'a

Analiza siatki błędów Clarke'a (EGA) jest jednym ze standardów ilościowego określania dokładności systemów CGM.

Analiza siatki błędów Clarke'a mierzy dokładność poprzez porównywanie wartości stężenia glukozy u użytkownika systemu uzyskanych za pomocą systemu CGM z wartościami referencyjnymi uzyskanymi w laboratorium.

Analiza ta oblicza dokładność poprzez sprawdzanie liczby i odsetka punktów danych, które przypadają na 5 stref „ryzyka klinicznego”. Dane przedstawiane są zarówno na wykresie, jak i w tabeli.

- **Strefa A** (brak ryzyka) obejmuje wartości CGM mieszczące się **w** zakresie do  $\pm 20\%$  wartości referencyjnych.
  - Wartości strefy A są uważane za mieszczące się w akceptowanym przedziale dokładności systemów CGM.
- **Strefa B** (brak ryzyka) obejmuje wartości CGM mieszczące się **poza** zakresem do  $\pm 20\%$  wartości referencyjnych.
  - Wartości strefy B nie są uważane za mieszczące się w akceptowanym przedziale dokładności, ale ich różnica w porównaniu z wartościami referencyjnymi nie skutkuje podjęciem przez użytkownika systemu niewłaściwej decyzji o zastosowaniu leku.
- **Strefa C** (ryzyko niskie) obejmuje wartości CGM, które różniły się od wartości referencyjnych na tyle, aby użytkownik systemu mógł podjąć niewłaściwą decyzję o zastosowaniu leku na podstawie danych z systemu CGM.
- **Strefa D** (ryzyko średnie) zawiera wartości CGM, które były prawidłowo określone jako hipoglikemiczne lub hiperglikemiczne przez system referencyjny, ale nie przez system CGM.
  - Nieprawidłowe zidentyfikowanie wartości CGM jako hipoglikemicznej lub hiperglikemicznej może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Strefa E** (ryzyko wysokie) obejmuje wartości CGM, które zostały błędnie zidentyfikowane jako hipoglikemiczne, podczas gdy system referencyjny prawidłowo określił je jako hiperglikemiczne (i odwrotnie).
  - Błędne określenie wartości CGM jako hipoglikemicznej, gdy w rzeczywistości była ona wartością hiperglikemiczną (lub odwrotnie) jest sytuacją potencjalnie niebezpieczną.



## Prawidłowość kalibracji

Kontrola prawidłowości kalibracji polega na sprawdzeniu, czy na dokładność ma wpływ to, jak długi czas upłynął od ostatniej kalibracji systemu za pomocą wartości stężenia glukozy zmierzonej we krwi.

### Działanie systemu CGM wg czasu, jaki upłynął od ostatniej kalibracji

Czas od kalibracji	Liczba sparowanych odczytów CGM-YSI	Odsetek w zakresie do 20%	Odsetek w zakresie do 30%	Odsetek w zakresie do 40%
0–4 godz.	11324	84,5%	93,7%	97,2%
4–8 godz.	5743	85,1%	94,9%	97,9%
8–12 godz.	3618	84,2%	95,1%	98,0%
Łącznie	20685	84,6%	94,3%	97,5%

Ogólnie nie ma istotnej różnicy w dokładności wynikającej z tego, ile czasu minęło od rejestracji odczytów CGM po ostatniej kalibracji za pomocą wartości stężenia glukozy zmierzonej we krwi.



## Badania PRECISE II/PRECISION

Wydajność systemu Eversense CGM została poddana dalszej ocenie w dwóch wieloośrodkowych, nierandomizowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Stu dwudziestu pięciu (125) uczestników obserwowano przez 90 dni po wszczepieniu czujnika. W tych dwóch badaniach zastosowane nowe, zaktualizowane oprogramowanie algorytmu glukozy. Oba badania wykazały spójność na poziomie 87% i 85% odczytu CGM w granicach 15%\* wartości referencyjnych YSI. Analiza post hoc badania PRECISE II z użyciem algorytmu Software 602 wykazała 8,5% MARD.

## Badania wykonalności

W Stanach Zjednoczonych i Europie przeprowadzono dwa badania wykonalności w celu dokonania oceny żywotności czujnika. W tych badaniach 70 osobom wszczepiono czujnik Eversense na okres 6 miesięcy. Czujnik Eversense zastosowany w tych badaniach był taki sam jak w badaniach PRECISE II i PRECISION. W badaniach tych wykazano, że żywotność czujnika wynosi 97% w dniu 90., a 78–80% w 180. dniu.

\*Dla wartości poniżej 80 mg/dL, zastosowano wartość bezwzględną równą 15 mg/dL.

## Noszenie inteligentnego nadajnika

Wyliczono czas noszenia inteligentnego nadajnika. Ogólnie pacjenci w badaniu PRECISE byli w stanie nosić swoje inteligentne nadajniki średnio przez 22,4 godziny dziennie, przy czym mediana wyniosła 23,5 godziny. Mediana czasu noszenia w badaniach PRECISE II i PRECISION wynosiła 23,4 godziny.

## Bezpieczeństwo

Podczas 180-dniowego badania PRECISE zmienny czujnik życia będący częścią systemu CGM był bardzo dobrze tolerowany przez 81 włączonych uczestników. Przez ponad 21 000 dni noszenia czujnika w ramach badania nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych wynikających ze stosowania systemu lub związanych z zabiegiem wszczepienia/usunięcia czujnika. W badaniu PRECISE II zgłoszono jedno poważne zdarzenie niepożądane związane z procedurą wszczepienia/usunięcia. W badaniu PRECISION nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych wynikających ze stosowania systemu lub związanych z zabiegiem wszczepienia/usunięcia czujnika. Łagodne podrażnienie i zaczerwienienie w miejscu wszczepienia były obserwowane z małą częstością występowania w badaniu PRECISE oraz podczas rzeczywistego stosowania przez 3066 badanych.

## 20. Dane techniczne

### Czujnik

Charakterystyka	Opis
Wymiary	Długość: 18,3 mm Średnica: 3,5 mm
Materiały	Homopolimerowy polimetakrylan metylu (PPMA), hydrożel na bazie metakrylanu hydroksyetylu (HEMA), platyna, silikon, octan deksametazonu, epoksyd 301-2
Zakres glukozy	40–400 mg/dL
Czas eksploatacji czujnika	Maksymalnie 180 dni
Kalibracja	Dostępny w handlu osobisty glukometr
Zakres kalibracji	40–400 mg/dL
Sterylizacja	Sterylizacja tlenkiem etylenu

## Inteligentny nadajnik

Charakterystyka	Opis
Wymiary	Długość: 37,6 mm Szerokość: 48,0 mm Grubość: 8,8 mm
Materiały	Korpus: poliwęglan
Waga	11,3 g
Zasilacz	Bateria litowo-jonowa (niewymienna)
Warunki eksploatacyjne	5–40°C (41–104°F)
Okres eksploatacji	12 miesięcy
Warunki przechowywania.	0–35°C (32–95°F)
Ochrona przed wilgocią	IP67: wodoszczelny, można zanurzyć na głębokość 1 metra na 30 minut
Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym	Część klasy BF wchodząca w bezpośredni kontakt z ciałem użytkownika systemu
Ładować przy użyciu adaptera prądu zmiennego	15 minut do pełnego naładowania
Zasięg	Odległość między aplikacją a nadajnikiem może wynosić maksymalnie 7,6 metra (25 stóp) Łączność bezprzewodowa z aplikacją nie działa dobrze przy zanurzeniu w wodzie. Zasięg ulegnie zmniejszeniu, jeżeli użytkownik jest w wannie, łóżku wodnym, basenie itd.
Ciśnienie w kabinie	700–1060 hPa
Zakres wilgotności względnej (bez kondensacji)	15–90%
Wysokość nad poziomem morza	3048 metrów (10 000 stóp)

## Zasilacz i ładowarka

Charakterystyka	Opis
Klasa	II
Wejście	Napięcie wejściowe — prąd przemienny, 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3–0,15 A
Napięcie wyjściowe stałoprądowe	5 V DC, 1 A (5,0 W)
Ochrona przed wilgocią (stacja dokująca)	IP22

## Przewód USB\* do ładowania i pobierania

Charakterystyka	Opis
We/wy	5 V DC, 1 A
Typ	Od USB-A do USB micro-B
Długość	91 cm (36 cali)

\*Niewłaściwe posługiwanie się przewodem USB może grozić uduszeniem. Przewód USB można podłączać do zasilacza/ładowarki i ładować z gniazda sieciowego. W celu odcięcia systemu należy odłączyć ładowarkę/zasilacz od gniazda ściennego. Ładując inteligentny nadajnik poprzez port USB w komputerze osobistym, należy upewnić się, że komputer spełnia wymogi standardu bezpieczeństwa IEC 60950-1 (lub jego odpowiednika).

## Normy techniczne

### Zalecenia i deklaracje producenta — odporność elektromagnetyczna

Nadajnik został zaprojektowany do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym w tabeli.

Użytkownik powinien zapewnić zgodne środowisko pracy dla nadajnika.


### Specyfikacja odporności elektromagnetycznej nadajnika

Test odporności	Test odporności	Poziom zgodności nadajnika	Zalecenia dotyczące środowiska elektromagnetycznego
Wyładowania elektryczne (ESD) IEC 61000-4-2	$\pm 8$ kV, kontaktowo $\pm 15$ kV, powietrze	$\pm 8$ kV, kontaktowo $\pm 15$ kV, powietrze	Posadzki powinny być wykonane z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. W przypadku pokrycia posadzek materiałem syntetycznym wilgotność powinna wynosić co najmniej 30%.
Pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej (110 V AC / 60 Hz, 230 V AC / 50 Hz) wg normy IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej powinny mieć poziomy charakterystyczne dla typowej lokalizacji w typowym środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

## Normy bezpieczeństwa i elektryczne (cd.)

System Eversense XL CGM jest przeznaczony do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym w poniższej tabeli. Użytkownicy systemu powinni zapewnić jego użytkowanie zgodnie ze specyfikacją.

### Specyfikacja odporności elektromagnetycznej systemu

Test odporności	Poziom testowy wg normy IEC 60601	Poziom zgodności nadajnika	Zalecenia dotyczące środowiska elektromagnetycznego
Odporność na zakłócenia przewodzone o częstotliwości radiowej wg normy IEC 61000-4-6 (tylko smartfon [urządzenie odbiorcze])	$\geq 3$ Vrms (od 150 kHz do 80 MHz)	3 Vrms	Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń oznaczonych następującym symbolem: 
Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wg normy IEC 61000-4-3	$\geq 10$ V/m w zakresie od 80 MHz do 2700 MHz (modulacja amplitudowa, AM)	3 Vrms	

**Uwaga nr 1:** Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.

**Uwaga nr 2:** Zalecenia te mogą nie obowiązywać we wszystkich sytuacjach. Wpływ na propagację elektromagnetyczną ma wchłanianie przez i odbijanie się od konstrukcji, obiektów i ludzi.

- a. Natężeń pól generowanych przez różne nadajniki, takie jak stacje bazowe telefonii radiowej (komórkowej/bezprzewodowej) oraz radiotelefony, radia amatorskie, nadajniki radiowe AM i FM oraz nadajniki telewizyjne oraz transmisje telewizyjne, nie można precyzyjnie przewidzieć w sposób teoretyczny. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne z uwzględnieniem stałych nadajników radiowych, należałoby rozważyć pomiary pól elektromagnetycznych w lokalizacji. Jeżeli zmierzone natężenia pól w miejscu użytkowania systemu Eversense XL CGM przekracza wyżej wymieniony poziom zgodności radiowej, należy obserwować system Eversense XL CGM w celu zweryfikowania jego normalnej pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy systemu może wystąpić konieczność zastosowania środków dodatkowych, jak np. przeorientowanie lub przeniesienie systemu Eversense XL CGM.
- b. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pól powinny być mniejsze niż 10 V/m.

## Normy bezpieczeństwa i elektryczne (cd.)

### Zalecenia i deklaracje producenta — emisje elektromagnetyczne

System przenośny Eversense XL CGM jest przeznaczony do użytkowania w środowisku elektromagnetycznym określonym w następującej tabeli. Użytkownik powinien zapewnić zgodne środowisko pracy systemu.








Test emisji	Zgodność	Zalecenia dotyczące środowiska elektromagnetycznego
Emisje radiowe wg CISPR 11	Grupa 1	System Eversense XL CGM wykorzystuje energię na częstotliwościach radiowych tylko do realizowania funkcji wewnętrznych. W związku z powyższym jego emisje radiowe są bardzo niskie i raczej nie powodują żadnych zakłóceń w pobliskich urządzeniach elektronicznych.
Emisje radiowe wg CISPR 11	Klasa B	System Eversense XL CGM można użytkować we wszystkich pomieszczeniach, także mieszkalnych, podłączonych bezpośrednio do publicznej sieci energetycznej zasilającej w energię wykorzystywaną w gospodarstwach domowych.

### Zalecane odległości oddzielające smartfon (urządzenie odbiorcze) od innych urządzeń przenośnych/mobilnych do komunikacji radiowej.







Zastosuj odległości jak w instrukcji producenta smartfona (lub innego urządzenia odbiorczego). Użytkownik smartfona (lub innego urządzenia odbiorczego) może zapobiegać zakłóceniom elektromagnetycznym przez zachowanie minimalnej odległości co najmniej 30 cm między smartfonem (lub innym urządzeniem odbiorczym) i innym urządzeniem przenośnym/mobilnym do komunikacji radiowej (nadajnik). Przenośne/mobilne urządzenia do komunikacji radiowej obejmują: elektroniczne nianie, słuchawki Bluetooth, routery bezprzewodowe, kuchenki mikrofalowe, laptopy z kartami WiFi, telefony komórkowe, skanery RFID, ręczne wykrywacze metalu wykorzystywane podczas kontroli bezpieczeństwa.



## Symbole aplikacji mobilnej Eversense XL

Symbol	Objaśnienie
	<b>Alert poziomu glukozy</b> Pojawia się wtedy, gdy poziom glukozy wykracza poza górną lub dolną wartość progową alertu poziomu glukozy. Ikona pojawi się na ekranie <b>HISTORIA ALERTÓW</b> .
	<b>Alert szybkości spadania</b> Pojawia się, kiedy poziom glukozy spada w tempie przekraczającym określoną wartość.
	<b>Alert szybkości wzrostu</b> Pojawia się, kiedy poziom glukozy rośnie w tempie przekraczającym określoną wartość.
	<b>Alert rozładowanej baterii</b> Pojawia się, gdy bateria nadajnika jest całkowicie rozładowana.
	<b>Alert niskiego poziomu baterii</b> Pojawia się, gdy w baterii nadajnika pozostało mniej niż 10% energii.
	<b>Alert inteligentnego nadajnika / czujnika</b> Ikona pojawia się tylko na ekranie <b>HISTORIA ALERTÓW</b> .
	<b>Powiadomienia inteligentnego nadajnika / czujnika</b> Pojawiają się, gdy istnieją powiadomienia dotyczące inteligentnego nadajnika lub czujnika.

## Symbole w aplikacji mobilnej Eversense XL (cd.)






Symbol	Objaśnienie
	<b>Alert kalibracji</b> Pojawia się gdy istnieją alerty związane z kalibracją.
	<b>Powiadomienie o kalibracji</b> Pojawia się, gdy istnieją powiadomienia związane z kalibracją.
	<b>Niepowodzenie kalibracji</b> Pojawia się, gdy inteligentny nadajnik odrzuci wartość kalibracyjną wprowadzoną przez użytkownika.
	<b>Niepowodzenie połączenia</b> Pojawia się, gdy inteligentny nadajnik jest odłączony od smartfona lub gdy czujnik nie jest połączony z inteligentnym nadajnikiem.
	<b>Alerty łączone (więcej niż jeden alert lub więcej niż jedno zdarzenie)</b> Pojawia się w przypadku odebrania dwóch lub więcej alertów w krótkim odstępie czasu.
	<b>Profil tymczasowy</b> Pojawia się wtedy, gdy profil tymczasowy zostanie aktywowany.



## Symbole na opakowaniu i urządzeniu

Symbol	Objaśnienie
	Zapoznać się z załączoną dokumentacją
	Przeostaga: zapoznać się z załączoną dokumentacją
	Termin ważności
	Producent
	Upoważniony przedstawiciel na obszarze Wspólnoty Europejskiej
	Data produkcji
	Zakres temperatury przechowywania
	Numer partii
	Uniwersalna magistrala szeregową (USB)

Symbol	Objaśnienie
	Oznaczenie potwierdza, że urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Rady Europy 90/385/EWG
	Numer katalogowy
	Numer seryjny
	Część klasy BF wchodząca w bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta
	Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne
	Wyprodukowano bez użycia lateksu naturalnego
	Identyfikator FCC jest przypisany do wszystkich urządzeń stanowiących przedmiot certyfikacji.
	Niejałowy

## Symbole na opakowaniu i urządzeniu (cd.)

Symbol	Objaśnienie
	Obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) jest przeciwwskazane w przypadku inteligentnego nadajnika.
	Brak znanych zagrożeń związanych z pozostawieniem wszczepionego czujnika podczas badania MR ze statycznym polem magnetycznym 1,5 T lub 3,0 T, pod warunkiem ścisłego przestrzegania instrukcji skanowania. Pełne informacje można znaleźć w części Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI.
	Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 2012/19/UE
	Wyłącznie do użytku jednorazowego
	Nie sterylizować powtórnie

Symbol	Objaśnienie
	Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone
	Sterylizowano tlenkiem etylenu
	Pojedyncza bariera sterylna: sterylizacja tlenkiem etylenu
	Zastosuj się do instrukcji użytkowania
	Wyrób medyczny

# Warunki ograniczonej gwarancji inteligentnego nadajnika

## 1. Zakres i czas obowiązywania ograniczonej gwarancji

Firma Senseonics, Incorporated („Senseonics”) gwarantuje użytkownikowi końcowemu („użytkownik”) inteligentnego nadajnika Eversense XL („inteligentny nadajnik”), że ów inteligentny nadajnik jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach eksploatacyjnych przez okres jednego roku (365 dni), począwszy od dnia pierwszego odebrania inteligentnego nadajnika od pracownika służby zdrowia („okres gwarancji ograniczonej”). Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi szczególne prawa, przy czym mogą mu też przysługiwać dodatkowe prawa, w zależności od jurysdykcji. Niniejsza ograniczona gwarancja jest uwarunkowana obowiązkiem przekazywania firmie Senseonics pisemnych powiadomień o wszelkich wadach materiałowych i/lub wykonania niezwłocznie po ich wykryciu oraz stwierdzeniu przez firmę Senseonics, że roszczenie jest skutkiem wystąpienia wady materiałowej i/lub wykonania. Jeżeli firma Senseonics dostarczy zastępczy inteligentny nadajnik zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji ograniczonej, pozostały okres gwarancji dotyczący oryginalnego inteligentnego nadajnika zostanie przeniesiony na zastępczy inteligentny nadajnik, przy czym taki okres gwarancyjny zakończy się w dniu pierwszej rocznicy pierwszego odebrania inteligentnego nadajnika od pracownika służby zdrowia, a gwarancja obejmująca nadajnik oryginalny zostanie anulowana.

## 2. Wyłączenia ograniczonej gwarancji.

Ograniczona gwarancja obejmuje tylko inteligentny nadajnik wyprodukowany przez firmę Senseonics i jest uwarunkowana właściwym użytkowaniem produktu. Ograniczona gwarancja nie obejmuje a) uszkodzeń mechanicznych, zarysowań lub innych uszkodzeń powierzchni i części odsłoniętych, powstałych w toku normalnego użytkowania; b) uszkodzeń będących skutkiem wypadku, zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania, wystąpienia nietypowych naprężeń fizycznych, elektrycznych lub elektromechanicznych, lub modyfikacji dowolnej części produktu; c) urządzeń, których numer identyfikacyjny został usunięty, zmieniony lub w inny sposób uczyniony nieczytelnym; d) przypadków nieprawidłowego działania będącego skutkiem użytkowania (inteligentnego nadajnika) z produktami, akcesoriami lub urządzeniami peryferyjnymi nieprzeznaczonymi lub niezatwierdzonymi do tego celu; e) materiałów eksploatacyjnych (baterii); f) urządzeń rozmontowanych; g) uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania, testowania, konserwacji, instalacji lub regulacji.

Inteligentny nadajnik jest wodoszczelny, zgodnie ze specyfikacją wymienioną w instrukcji użytkownika. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń na skutek działania wody w przypadku, gdy obudowa nadajnika jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do usług, urządzeń i oprogramowania towarzyszącego, używanego w połączeniu z nadajnikiem inteligentnym.

### **3. Zobowiązania firmy Senseonics wynikające z ograniczonej gwarancji.**

Jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem dla użytkownika oraz jedynym i wyłącznym zobowiązaniem firmy Senseonics wynikającym z niniejszej ograniczonej gwarancji jest bezpłatna naprawa lub wymiana, wg uznania firmy Senseonics, pod warunkiem że wada powstała oraz odnośne ważne roszczenie zostało zgłoszone firmie Senseonics w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji. Wadliwy inteligentny nadajnik należy zwrócić do autoryzowanego działu obsługi klienta firmy Senseonics w odpowiednim opakowaniu wysyłkowym, chroniącym inteligentny nadajnik przed dalszym uszkodzeniem, opatrzonym imieniem nazwiskiem i adresem użytkownika, imieniem nazwiskiem i adresem pracownika służby zdrowia, od którego użytkownik otrzymał nadajnik, datą i numerem identyfikacyjnym inteligentnego nadajnika. Adres do wysyłki inteligentnego nadajnika można znaleźć na stronie <https://global.eversensediababetes.com/contact-us>. Po odebraniu nadajnika firma Senseonics podejmie decyzję, czy inteligentny nadajnik jest objęty ograniczoną gwarancją, a jeżeli ochrona gwarancyjna nie została anulowana, niezwłocznie wymieni inteligentny nadajnik. W przypadku, gdy firma Senseonics stwierdzi, że inteligentny nadajnik nie podlega ochronie z tytułu ograniczonej gwarancji, użytkownik może wykupić nadajnik zastępczy. Jeżeli użytkownik zażąda zwrotu oryginalnego nadajnika, będzie musiał pokryć koszty jego wysyłki.

Taki naprawiony lub wymieniony inteligentny nadajnik będzie objęty gwarancją równą pozostałej części okresu gwarancyjnego oryginalnego inteligentnego nadajnika lub obowiązującą przez (30) dni od daty wymiany lub naprawy, zależnie od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

### **4. Ograniczenia zobowiązań firmy Senseonics wynikające z ograniczonej gwarancji.**

OPISANA WYŻEJ OGRANICZONA GWARANCJA FIRMY SENSEONICS JEST GWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻNE BĄDŹ DOMYŚLANE, USTAWOWE BĄDŹ INNE. FIRMA SENSEONICS JEDNOZNACZNIE WYKLUCZA I ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH TAKICH GWARANCJI, ŁĄCZNIE Z M.IN. SUGEROWANYMI GWARANCJAMI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW INNYCH PODMIOTÓW, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, NIEZAKŁÓCENIA, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ANI GWARANCJAMI WYNIKAJĄCYMI Z PROCEDOWANIA, PRAWA, UŻYTKOWANIA LUB PRAKTYK HANDLOWYCH. W ZAKRESIE DOZWOŁONYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM FIRMA SENSEONICS NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA PRZED PRAWEM ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, NIEISTOTNE, POWIĄZANE LUB POŚREDNIE, NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYCZYNY, WYNIKŁE ZE SPRZEDAŻY, UŻYTKOWANIA, NIEWŁĄŚCIWEJ EKSPLOATACJI LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA

INTELIGENTNEGO NADAJNIKA BĄDŹ SYSTEMU EVERSENSE XL FIRMY SENSEONICS. OGRANICZENIE TO BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU, GDY FIRMA SENSEONICS LUB JEJ PRZEDSTAWICIEL ZOSTAŁ POINFORMOWANY O TAKICH SZKODACH, NIEZALEŻNIE OD NIEPOWODZENIA ZASADNICZEGO CELU TEGO OGRANICZONEGO ZADOŚĆCZYNIENIA. NINIEJSZA GWARANCJA OGRANICZONA NIE ROZCIAGA SIĘ NA OSOBY INNE NIŻ ORYGINALNY UŻYTKOWNIK KOŃCOWY TEGO PRODUKTU I OKREŚLA WYŁĄCZNE ZADOŚĆCZYNIENIE. W PRZYPADKU, GDY DOWOLNY FRAGMENT NINIEJSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ OKAŻE SIĘ NIEEGZEKWOWALNY NA MOCY PRAWA W ZAKRESIE, W JAKIM FIRMA SENSEONICS NIE MOŻE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA JEDNOZNACZNIE ZRZEC SIĘ SUGEROWANEJ GWARANCJI ANI OGRANICZYĆ SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SENSEONICS BĘDĄ MINIMALNE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Element systemu	Numer katalogowy
Zestaw inteligentnego nadajnika Eversense XL	FG-3400-55-001
Przewód do ładowania	FG-6100-50-301
Adapter do ładowania	FG-6201-95-301
Stacja dokująca	FG-6501-50-301
Przylpce Eversense, białe, 30 szt. w opakowaniu	FG-6400-50-301
Przylpce Eversense, przezroczyste, 30 szt. w opakowaniu	FG-6400-50-302
Skrócona instrukcja obsługi Eversense XL	LBL-1403-55-001
Instrukcja użytkownika systemu Eversense XL CGM	LBL-1402-55-001
Oprogramowanie do zarządzania danymi Eversense	FG-5200-01-300
Aplikacja mobilna Eversense XL dla systemu iOS	FG-5101-01-300
Aplikacja mobilna Eversense XL dla systemu Android	FG-5301-01-300

# Informacje prawne

---

## Informacje prawne firmy Apple

Określenia „Made for iPod touch”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do łączenia się odpowiednio z urządzeniem iPod touch, iPhone lub iPad oraz jest opatrzone certyfikatem jakości zgodnym ze standardami firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie niniejszego urządzenia ani za jego zgodność z normami elektrycznymi i normami bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na fakt, że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniami iPod touch, iPhone lub iPad może mieć wpływ na wydajność połączenia bezprzewodowego.

Apple, iPad, iPhone, iPod oraz iPod touch to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w USA i w pozostałych krajach.

## Informacje prawne firmy Google

Nazwa „Android”, logo Android oraz Google Play to znaki handlowe firmy Google Inc.

## Informacje o Bluetooth®

Bluetooth® to rodzaj komunikacji bezprzewodowej (radiowej). Technologia Bluetooth® jest wykorzystywana w smartfonach oraz wielu innych urządzeniach. Inteligentny nadajnik wykorzystuje technologię Bluetooth® Smart do parowania nadajnika z urządzeniem przenośnym oraz przesyłania wyników do aplikacji.

## Znak handlowy Bluetooth®

Znak handlowy i logotypy Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth® SIG, Inc. a firma Senseonics, Inc. używa ich na podstawie licencji.



## Informacje FCC

Inteligentny nadajnik spełnia wymagania części 15 Zasad FCC. Działanie urządzenia podlega poniższym warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- (2) Urządzenie musi tolerować wszystkie zakłócenia, łącznie z takimi, które mogą powodować niepożądane skutki.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez firmę Senseonics, Inc., mogą skutkować anulowaniem prawa użytkownika do użytkowania urządzenia.

Niniejsze zalecenia mają na celu zapewnienie, że inteligentny nadajnik nie będzie wpływał na działanie pobliskich urządzeń elektronicznych. Ponadto inne urządzenia elektroniczne nie powinny mieć wpływu na działanie inteligentnego nadajnika.

Z wyjątkiem obsługiwanego urządzenia mobilnego, pozostałe znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne, takie jak telefon komórkowy, kuchenka mikrofalowa lub sieć bezprzewodowa, mogą uniemożliwiać lub opóźniać przesyłanie danych ze smartfona do aplikacji. Oddalenie się od takich urządzeń elektronicznych może poprawić komunikację.

Inteligentny nadajnik został przetestowany, a testy potwierdziły jego przydatność do użytku domowego. W większości przypadków nie powinien on zakłócać działania innych urządzeń elektronicznych pod warunkiem przestrzegania zasad jego użytkowania. Inteligentny nadajnik emituje energię w postaci fal radiowych. W przypadku niewłaściwego użytkowania nadajnik może zakłócać pracę odbiorników telewizyjnych i radiowych lub innych urządzeń elektronicznych odbierających lub nadających fale radiowe.

W przypadku problemów z zakłóceniami należy oddalić się od źródła zakłóceń. Można też przesunąć urządzenie elektroniczne lub jego antenę w inne miejsce, co także rozwiąże problem zakłóceń.

W przypadku, gdy zakłócenia będą się powtarzać, należy skontaktować się z działem obsługi klienta producenta urządzenia elektronicznego będącego źródłem zakłóceń.

# Indeks

Alertów.....	59, 66, 68, 70, 75, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Aplikacja, informacje.....	9, 60
Aplikacja, informacje o produkcie.....	112, 113
Aplikacja, pobieranie.....	25
Aplikacja, szybki podgląd.....	115
Aplikacja, użytkowanie.....	52
Aplikacja, wylogowanie.....	80
Bateria, ładowanie.....	23
Bezprzewodowy.....	11, 22, 25, 52, 162
Bluetooth.....	60, 162
Bluetooth, ponowne włączanie.....	130
Czujnik, informacje.....	8, 123
Czujnik, wszczepianie i usuwanie.....	32, 124, 125
Ekran MOJA GLUKOZA.....	31, 52, 54, 59
Eversense DMS.....	109
Harmonogram posiłków.....	74
Informacje FCC.....	163
Instrukcja umieszczania, siła sygnału.....	38, 60
Inteligentny nadajnik, informacje.....	8, 15
Inteligentny nadajnik, konserwacja.....	41
Inteligentny nadajnik, mocowanie.....	37
Inteligentny nadajnik, resetowanie.....	91, 131
Inteligentny nadajnik, użytkowanie.....	35, 36
Inteligentny nadajnik, włączanie/wyłączanie.....	40
Jednostka miary.....	31
Kalibracja, faza codzienna.....	43, 46
Kalibracja, faza inicjalizacji.....	43, 45
Kalibracja, procedura.....	43, 47, 59
Kalibracja, przypomnienia.....	30, 72
Komponenty systemu.....	8, 15
Kontrolka LED.....	24, 35, 40, 42
Łączenie inteligentnego nadajnika z czujnikiem.....	32
Menu.....	59
Mój krąg.....	111, 117
Parowanie, inteligentny nadajnik i urządzenie mobilne.....	26, 29, 129
Podróże.....	126
Ponowne włączanie funkcji Bluetooth.....	130
Powiadomienia.....	81, 98, 99
Poziom naładowania baterii, wskaźnik.....	41
Poziomy docelowe.....	64
Profil tymczasowy.....	77
Przycisk na inteligentnym nadajniku.....	29, 35, 40
Przylepiec.....	37, 39
Raporty.....	59, 106
Resetowanie inteligentnego nadajnika.....	91, 131
RF to komunikacja wykorzystująca częstotliwości radiowe.....	162
Rozwiązywanie problemów, najczęściej zadawane pytania.....	127
Stacja dokująca.....	15
Strzałki trendu.....	57
Symbole, alerty, powiadomienia.....	155, 156
Symbole, opakowanie i urządzenie.....	157, 158
Tryb Nie przeszkadzać.....	76
Tryb „Widoczny”.....	29, 130, 132
Udostępni moje dane.....	109
Urządzenie przenośne.....	25, 52
Urządzenie przenośne, Apple Watch.....	114
USB, gniazdo.....	23
USB, kabel.....	23
Ustawienia, aplikacja.....	26, 60, 62, 73
Wykres trendu.....	58
Zasilacz.....	24
Zdarzenia.....	59, 100

Uwagi

---

---

---

---

---

---

---

---

---





Dystrybucja:

Polska

Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

Polska

+48 22 372 7220

[www.ascensia.com/eversense](http://www.ascensia.com/eversense)



Wyprodukowano przez Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows Parkway

Germantown, MD 20876-7005 USA

844.SENSE4U | 301.515.7260

(844.736.7348)

[global.eversenseddiabetes.com](http://global.eversenseddiabetes.com)



**Emergo Europe**

Prinsessegracht 20

2514 AP, The Hague

Holandia



Authorised 2016



(241) LBL-1402-55-001\_REV\_H

© Senseonics, Inc. 2023 PN: LBL-1402-55-001 Rev H 05/2023

<b>Dimensions</b>	
Trim: 6.75" w x 5.8" h	Bleed: 0.125"
Folded <i>(Include folded dimensions if applicable)</i> :	

<b>Colors:</b> 4/color
Spot <i>(Name PMS colors if applicable)</i> : N/A

<b>Paper Weight:</b>
Cover: 65# Gloss Cover
Text: 60# Gloss Text