

eversense^{E3}

Guide de l'utilisateur

Guide pour l'utilisation du système de mesure continue du taux de glucose Eversense E3

Capteur

Smart Transmetteur

Application mobile



Marques déposées Eversense E3

Eversense E3, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring, Eversense E3 CGM, Eversense E3 Sensor, Eversense E3 Smart Transmitter, Eversense App et le logo Eversense E3 sont des marques déposées de Senseonics, Incorporated. Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

| | | | |
|--|----|---|----|
| Glossaire..... | 6 | 3. Prise en main..... | 27 |
| I. Introduction..... | 9 | Charger votre Smart Transmetteur | 28 |
| Aide et Support clientèle | 9 | Étape 1. Télécharger et installer l'application | 30 |
| Composants du système MGC | | Étape 2. Configurer l'application - Création du compte, jumelage et paramétrage | 31 |
| Eversense E3 | 10 | Icônes de connexion du Smart Transmetteur | 40 |
| Configuration du système | 14 | 4. Relier le capteur..... | 41 |
| Licence d'exploitation pour l'utilisateur final et politique de confidentialité | 14 | 5. Port quotidien du transmetteur..... | 48 |
| Appareils débloqués | 15 | Usage quotidien | 49 |
| Écran ou bouton cassé | 15 | Fixer le Smart Transmetteur au-dessus du capteur inséré | 50 |
| Modifications de l'appareil | 15 | Mettre en marche et arrêter le Smart Transmetteur | 54 |
| Mode d'emploi | 15 | Entretien et maintenance du Smart Transmetteur | 55 |
| Informations relatives à la sécurité de l'IRM | 16 | Indicateur du niveau de charge de la pile | 56 |
| Contre-indications | 17 | DEL d'état | 57 |
| Éléments du kit | 18 | | |
| Comment utiliser ce Guide | 18 | | |
| 2. Avantages et risques..... | 19 | | |
| Risques et effets indésirables | 21 | | |
| Avertissements | 22 | | |
| Mises en garde | 24 | | |

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| 6. Étalonner le système..... | 59 | Régler les alertes prédictives | 100 |
| Phases d'étalonnage | 62 | Régler les alertes de taux de variation | 102 |
| Comment effectuer l'étalonnage | 65 | Régler les rappels d'étalonnage quotidiens | 104 |
| 7. Utiliser l'application..... | 69 | Régler les informations système | 105 |
| Gestion du compte Eversense | 70 | Rétablir la liaison avec un capteur | 106 |
| Vérifier les paramètres de votre appareil mobile. | 71 | Régler les tonalités | 108 |
| Bien connaître l'écran « Mon Glucose » | 72 | Réglage de Contournement hypoglycémie | 110 |
| Flèches de tendance | 75 | Paramètre Transmetteur déconnecté | 116 |
| Compréhension des décisions de traitement avec MGC | 76 | Configurer le profil temporaire | 120 |
| Veuillez en parler avec votre professionnel de santé | 78 | 9. Description des alertes..... | 123 |
| Prendre des décisions de traitement avec Eversense E3 | 81 | Historique des alertes | 125 |
| Flèches de tendance Eversense E3 et décisions de traitement | 83 | Description des alertes et actions requises | 127 |
| Que feriez-vous | 86 | 10. Journal des événements..... | 154 |
| Graphe de tendance | 91 | Glucose | 156 |
| Options de menu | 92 | Repas | 158 |
| 8. Personnaliser vos paramètres..... | 94 | Insuline | 159 |
| Niveaux d'alerte du taux de glucose | 96 | Santé | 160 |
| Définir les niveaux cibles du taux de glucose | 98 | Exercice | 161 |
| | | II. Rapports..... | 162 |
| | | Récap modal hebdo | 163 |
| | | Diagramme circulaire de glucose | 164 |
| | | Statistiques du taux de glucose | 164 |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 12. Partage de données..... | 165 | 16. À propos du capteur..... | 208 |
| Programme de gestion des données Eversense DMS (Data Management Software) | 165 | Étapes pour l'insertion | 209 |
| Partager mes données | 165 | Étapes pour l'extraction | 210 |
| Synchroniser | 166 | 17. Voyages..... | 211 |
| Mon Cercle | 168 | 18. Dépannage..... | 212 |
| Partage de l'application | 169 | Smart Transmetteur | 212 |
| 13. Informations produit et informations générales sur l'application..... | 170 | Recharge de la pile du Smart Transmetteur | 214 |
| Photo du profil | 172 | Connexion au Smart Transmetteur | 216 |
| Se déconnecter | 174 | Étalonnage | 220 |
| 14. Afficher des données Eversense E3 sur une montre Apple Watch..... | 175 | Alertes et notifications | 221 |
| Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch | 178 | Valeurs du taux de glucose | 223 |
| 15. Mon Cercle..... | 199 | Décisions de traitement | 225 |
| Surveillance à distance avec le système MGC Eversense E3 et l'application Eversense NOW | 199 | Flèches de tendance | 226 |
| | | Application | 226 |
| | | Capteur | 229 |
| | | Événements | 231 |
| | | Synchroniser | 231 |
| | | Raccourcis | 232 |
| | | 19. Performance de l'appareil | 233 |
| | | Étude clinique de la performance | 233 |
| | | Précision d'Eversense E3 par rapport à YSI dans l'étude PROMISE | 235 |
| | | Durée de vie du capteur | 245 |
| | | Sécurité | 246 |

| | | | |
|---|------------|--------------------------------------|------------|
| 20. Spécifications techniques... | 247 | 22. Eversense NOW..... | 313 |
| Capteur | 247 | Surveillance à distance avec | |
| Smart Transmetteur | 248 | le système MGC et l'application | |
| Alimentation et chargeur | 249 | Eversense NOW | 313 |
| Câble USB* pour la charge | | Utiliser l'application Eversense NOW | 316 |
| et le téléchargement | 249 | Rejoindre le Cercle Eversense | 318 |
| Normes électriques et normes | | Invitation dans le cercle | 320 |
| de sécurité | 250 | Menu principal | 324 |
| Symboles utilisés sur l'application | | Afficher des données MGC | 326 |
| mobile MGC Eversense | 253 | Mentions légales..... | 338 |
| Symboles figurant sur l'emballage | | Mention légale d'Apple | 338 |
| et sur les appareils | 256 | Mention légale de Google | 338 |
| Garantie limitée applicable au | | À propos du Bluetooth® | 338 |
| Smart Transmetteur Eversense E3 | 259 | Marque déposée Bluetooth® | 338 |
| 21. DMS Eversense..... | 262 | Informations FCC | 339 |
| Introduction | 262 | Directive sur les équipements radio | 340 |
| Prise en main | 263 | Index..... | 341 |
| Rapports supplémentaires | 280 | | |
| Paramètres | 297 | | |
| Glucose | 297 | | |
| Transmetteur | 301 | | |
| Télécharger les données de l'appareil | 301 | | |
| Partage de données | 308 | | |
| Partage de données avec | | | |
| votre clinique | 308 | | |
| Aide | 311 | | |

Glossaire

« **HYPER** » Indique une valeur du taux de glucose capteur mesurée par le capteur > 22,2 mmol/l.

« **HYPO** » Indique une valeur du taux de glucose capteur < 2,2 mmol/l.

Alerte Une alerte vous prévient d'une situation qui requiert votre attention et à laquelle vous devez répondre ou face à laquelle vous devez prendre les dispositions qui s'imposent.

Appareil déplombé Appareil (iPhone ou iPad) qui a été modifié pour supprimer les contrôles et limites imposés par le fabricant d'origine.

Appareil mobile Appareil portable avec un système d'exploitation mobile et l'application Eversense App qui communique avec le Smart Transmetteur.

Application Client Eversense Une application de bureau permettant aux utilisateurs d'Eversense de charger les données de leur Smart Transmetteur sur le système de gestion des données via un câble USB.

Application Eversense App Programme logiciel installé sur un appareil mobile et utilisé pour afficher les taux de glucose du MGC envoyés par le Smart Transmetteur.

Bluetooth® Nom commercial d'une technologie de réseau sans fil qui utilise des ondes courtes (RF) pour connecter sans fil des appareils mobiles et d'autres appareils électroniques.

Capteur Dispositif inséré sous la peau pour mesurer en continu le taux de glucose dans le liquide interstitiel.

Capteur relié Capteur qui est connecté à un Smart Transmetteur.

Compatible avec l'IRM Un article dont l'innocuité dans un environnement d'IRM a été démontrée dans des conditions définies, y compris des conditions de champ magnétique statique, des champs magnétiques dont le niveau varie dans le temps et des champs de radiofréquences.

Contre-indication État ou circonstance qui empêche une personne d'utiliser le dispositif.

CT Tomographie par ordinateur

DEL Diode électroluminescente

Étalonnage Valeur de glycémie provenant d'un test par piqûre au doigt que l'on entre dans l'application Eversense pour vérifier la précision du système. Avec le système Eversense E3, il y a deux phases : la phase d'initialisation, durant laquelle vous devez faire 4 piqûres au doigt et la phase d'étalonnage quotidien durant laquelle vous devez faire une ou deux piqûres au doigt par jour.

EULA Licence d'exploitation pour l'utilisateur final

Eversense NOW Application mobile de suivi du glucose à distance vous permettant de partager vos données de glucose avec d'autres personnes.

FAQ Foire aux questions

Glycémie Valeur de la glycémie obtenue au moyen d'un test par piqûre au doigt.

Hyperglycémie Épisode de glycémie élevée (trop de glucose dans le sang).

Hypoglycémie Épisode de glycémie faible (pas assez de glucose dans le sang).

Interférence électromagnétique Champ énergétique fort généré par des appareils électriques ou magnétiques.

IRM Imagerie par résonance magnétique

Lecteur de glycémie Appareil vendu commercialement utilisé pour mesurer la glycémie dans une gouttelette de sang prélevée au bout du doigt.

Liquide interstitiel Liquide qui circule entre les cellules du corps. Le système MGC Eversense E3 mesure le taux de glucose du liquide interstitiel et le compare à la valeur de la glycémie (taux de glucose sanguin) obtenue par piqûre au bout du doigt.

mg/dl Milligrammes par décilitre, unité de mesure qui indique la concentration d'une substance dans une quantité de liquide spécifique. Dans certains pays, dont les États-Unis, les résultats du taux de glucose sont rapportés en mg/dl ; ils indiquent quelle quantité de glucose on trouve dans le sang avec un lecteur de glycémie, ou quelle quantité de glucose on trouve dans le liquide interstitiel avec un système MGC comme le système MGC Eversense E3.

MGC Mesure continue du taux de glucose (MGC). Surveillance continue de votre taux de glucose interstitiel toutes les quelques minutes.

mmol/l Milli-moles par litre, unité de mesure qui indique la concentration d'une substance dans une quantité de liquide spécifique. Dans de nombreux pays, les résultats du taux de glucose sont rapportés en mmol/l ; ils indiquent quelle quantité de glucose on trouve dans le sang avec un lecteur de glycémie, ou quelle quantité de glucose on trouve dans le liquide interstitiel avec un système MGC comme le système MGC Eversense E3.

Mode Ne pas déranger (NPD dans l'application Eversense App) Lorsque ce mode est activé, l'application mobile cesse d'afficher les alertes non critiques et le Smart Transmetteur arrête de donner des notifications par vibreur pour les alertes non critiques. Les alertes critiques seront toujours fournies. De nombreux appareils mobiles ont un mode Ne pas déranger qui leur est propre. Consultez le manuel de leur fabricant pour plus de détails.

Paramètre de rappel Utilisé pour définir combien de fois les alertes se répètent.

Phase de préchauffage Durée dont le capteur a besoin pour s'ajuster une fois qu'il a été inséré et avant de l'étalonner.

Professionnel de santé Un professionnel de santé habilité ayant suivi avec succès le programme de formation sur l'insertion et l'extraction du système MGC Eversense E3 et ayant lu et compris les instructions pour l'insertion et le retrait du capteur MGC Eversense E3.

Smart Transmetteur Dispositif réutilisable porté à l'extérieur du corps au-dessus du capteur qui alimente le capteur et envoie les valeurs du taux de glucose vers l'appareil mobile pour y être affichées dans l'application Eversense App.

Sous-cutané Situé sous la peau.

Suivi à distance Fonction optionnelle qui vous permet d'inviter d'autres personnes à consulter vos données MGC avec Eversense NOW, une application mobile distincte qu'ils téléchargent sur un appareil mobile compatible.

Synchronisation automatique Lorsque cette fonctionnalité est activée sur l'application mobile Eversense, vos données et paramètres du taux de glucose se synchronisent automatiquement dans le DMS Eversense toutes les deux heures.

Système de gestion des données (DMS) Eversense Application sur serveur compatible avec l'application Eversense App dans laquelle sont stockées et visualisées vos valeurs du taux de glucose.

Taux de variation/flèches de tendance Indicateurs du sens et de la vitesse de variation de votre taux de glucose.

Valeurs glycémiques du capteur Valeur du taux de glucose mesurée par le capteur Eversense.

I. Introduction

Cette section explique comment utiliser ce Guide, décrit votre nouveau système MGC Eversense E3 et présente ses composants, ainsi que son utilisation prévue.

Félicitations ! Vous voilà muni(e) de la technologie MGC Eversense E3 pour la prise en charge de votre diabète. Votre système MGC Eversense E3 est conçu pour mesurer votre taux de glucose en continu pendant une durée allant jusqu'à 180 jours, à compter de la date d'insertion de votre capteur. Les valeurs du taux de glucose collectées par le système sont envoyées automatiquement sur votre appareil mobile. Vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin ou professionnel de santé pour insérer ou retirer votre capteur.

Aide et Support clientèle

Passez en revue le Guide de l'utilisateur avec votre professionnel de santé. Adressez vos questions ou les problèmes rencontrés avec un produit Eversense E3 au Support clientèle. L'appel de ce service est gratuit aux États-Unis : 844-SENSE4U (844-736-7348). En dehors des États-Unis, appelez votre distributeur local ; au besoin, allez à la page <https://global.eversensedibabetes.com> pour le localiser. Vous trouverez la version la plus récente de ce Guide de l'utilisateur à l'adresse <https://global.eversensedibabetes.com>.

Composants du système MGC Eversense E3

Le système comprend 1) un petit capteur inséré en sous-cutané par un médecin ou professionnel de santé, 2) un Smart Transmetteur amovible qui se porte au-dessus du capteur et 3) une application mobile pour afficher les valeurs du taux de glucose.

Capteur Eversense E3

Le capteur est inséré sous la peau (dans le bras) et mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel pendant un maximum de 180 jours. Les niveaux de glucose sont ensuite calculés par le Smart Transmetteur et envoyés à l'application.

Smart Transmetteur Eversense E3

Le transmetteur amovible se porte sur la peau au-dessus du capteur. C'est lui qui alimente le capteur. Il envoie les valeurs du taux de glucose via Bluetooth (sans fil) à l'application mobile. Le Smart Transmetteur fournit aussi des alertes par vibration sur le corps, en fonction des paramètres que vous avez définis pour le taux de glucose. Il contient une pile rechargeable réutilisable qu'il faut changer au bout d'un an.



Capteur




Smart Transmetteur

Application Eversense App

L'application Eversense App est une application qui s'exécute sur un appareil mobile (comme un smartphone ou une tablette) et affiche les valeurs du taux de glucose de différentes façons. Elle fournit aussi des alertes en fonction des paramètres que vous avez définis pour le taux de glucose.

Les écrans de l'application Eversense App ont une configuration variable selon le modèle et/ou le système d'exploitation de votre appareil mobile. Ce Guide de l'utilisateur contient quelques exemples de ces variantes.

Assurez-vous que votre appareil mobile utilise le dernier système d'exploitation indiqué comme compatible sur notre site Web à l'adresse <https://global.eversensediabètes.com/compatibility>.

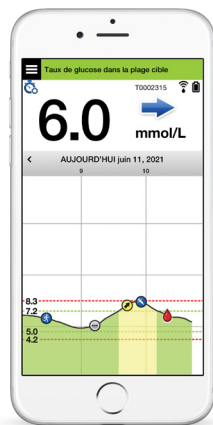

iOS



Android

IMPORTANT : pour pouvoir utiliser le système MGC Eversense E3, vous devez savoir comment télécharger et utiliser les applications mobiles sur votre portable. Les données sont envoyées par le Smart Transmetteur Eversense E3 via Bluetooth, sans fil. Lisez attentivement les instructions contenues dans ce Guide de l'utilisateur pour télécharger et installer l'application mobile Eversense App et pour relier votre appareil mobile avec le Smart Transmetteur. Si vous avez des difficultés à bien comprendre le Guide de l'utilisateur, contactez votre distributeur local.

Le système comprend également des patchs adhésifs jetables à usage quotidien, qui vous seront fournis par votre professionnel de santé après l'insertion de votre capteur. Le patch adhésif a un côté collant en acrylique qui se colle au dos du Smart Transmetteur et un côté collant en silicone qui se colle sur la peau.

Aperçu du système Eversense E3

Un système de surveillance de la glycémie (non fourni par Senseonics) est requis pour étalonner le système CGM et pour prendre des décisions thérapeutiques dans certaines conditions. Voir *Compréhension des décisions de traitement avec MGC*.

Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ces composants vous permettent de surveiller votre taux de glucose pendant une durée allant jusqu'à 180 jours.

Pour assurer la continuité de la réception des valeurs du taux de glucose et des informations connexes, suivez ces conseils chaque jour :

- ✓ Portez sur vous votre Smart Transmetteur à tout moment, sauf pendant qu'il se charge.
- ✓ Le Smart Transmetteur est étanche à une profondeur de 1 mètre (3,2 pieds) pendant 30 minutes. Exposer le Smart Transmetteur à des conditions plus extrêmes que mentionnées ci-dessus risque de l'endommager et annulera la garantie.
- ✓ Assurez-vous que votre Smart Transmetteur soit suffisamment chargé à tout moment.
- ✓ Effectuez deux tests d'étalonnage de la glycémie par jour lorsque le système vous y invite.
- ✓ Faites attention aux alertes et aux notifications que vous recevez sur votre Smart Transmetteur et sur votre appareil mobile.
- ✓ Remplacez l'adhésif de votre Smart Transmetteur tous les jours.
- ✓ Vous pouvez retirer le Smart Transmetteur de votre bras à tout moment, sauf durant l'étalonnage. Rappelez-vous qu'aucune donnée n'est collectée tant que votre Smart Transmetteur ne communique pas avec le capteur. Lorsque vous remettez en place le Smart Transmetteur au dessus du capteur, cela prend jusqu'à 10 minutes pour que la communication avec le capteur se rétablisse et pour que les valeurs du taux de glucose apparaissent dans l'application.

- ✓ Lorsque le Smart Transmetteur et l'appareil mobile ne sont pas à portée l'un de l'autre, les données collectées par le Smart Transmetteur sont gardées en mémoire et envoyées à l'application une fois que l'appareil mobile et le Smart Transmetteur se trouvent à nouveau à portée l'un de l'autre.
- ✓ Porter votre capteur et votre Smart Transmetteur lorsque vous passez dans des détecteurs de métal dans les aéroports ne présente pas de danger. En vol, le Smart Transmetteur se comporte comme tout autre appareil Bluetooth. Conformez-vous à toutes les directives de sécurité des compagnies aériennes.

Rappel des fonctions principales et avantages du système MGC Eversense E3 :

- Communication sans câble entre le capteur, le Smart Transmetteur et l'application.
- Port de longue durée (jusqu'à 180 jours) du capteur sur le bras.
- Alertes lorsque les seuils d'alerte d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie prédéfinis sont atteints.
- Alertes prédictives qui vous préviennent **avant** que vous n'atteigniez les seuils d'alerte d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie.
- Usage d'un appareil mobile (comme un smartphone) pour afficher les valeurs du taux de glucose.
- Alertes par vibration sur le corps générées par le Smart Transmetteur, même lorsque l'appareil mobile ne se trouve pas à proximité.
- Fournit des valeurs comprises dans la plage 2,2 à 22,2 mmol/l toutes les 5 minutes.
- Flèches de tendance qui vous montrent si votre taux de glucose monte ou descend et à quelle vitesse.
- Graphiques et statistiques montrant vos résultats de glucose dans des formats faciles à comprendre.
- Smart Transmetteur amovible et rechargeable.
- Fonctionnalité d'entrée d'événements (comme repas, exercice et insuline).
- Garde en mémoire les valeurs du taux de glucose dans l'application et sur le Smart Transmetteur.
- Cette application permet à d'autres personnes de suivre votre glucose à distance à l'aide de l'application mobile Eversense NOW.

Configuration du système

- Le système MGC Eversense E3.
- Un smartphone compatible avec Android ou un iPhone®, iPod® ou iPad® Apple muni de Bluetooth Smart (ou Bluetooth Low Energy). L'application Eversense App fonctionne aussi avec les montres Apple Watch®.
- Vous trouverez une liste d'appareils compatibles et de systèmes d'exploitation à l'adresse <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.
- L'application Eversense App téléchargée sur votre appareil mobile à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play™.

Licence d'exploitation pour l'utilisateur final et politique de confidentialité

L'utilisation de l'application Eversense App est soumise aux termes et conditions de la dernière licence d'exploitation pour l'utilisateur final d'Eversense et de sa Politique de confidentialité. Ces documents sont mis à jour périodiquement et sont postés à l'adresse <https://global.eversenseddiabetes.com>.

Appareils débloqués

N'utilisez PAS les applications Eversense App sur des iPhones ou iPods débloqués. Des appareils débloqués ne fournissent pas un niveau de sécurité acceptable pour l'utilisateur. Ils ne sont donc pas approuvés par Senseonics.

Écran ou bouton cassé

Si l'écran de votre appareil mobile est cassé ou si les boutons ne fonctionnent pas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser votre système Eversense E3 et risquez de manquer des événements d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.

Modifications de l'appareil

NE modifiez PAS le système MGC Eversense E3 pour l'utiliser avec des produits, accessoires ou périphériques qui ne sont pas fournis ou approuvés par écrit par Senseonics. Les modifications non autorisées annulent la garantie de votre transmetteur et peuvent impacter les performances du système.

Mode d'emploi

Le système MGC Eversense E3 est conçu pour mesurer en continu le taux de glucose chez les adultes (18 ans ou plus) pendant 180 jours au maximum. Ce système est conçu pour remplacer les mesures de glycémie par piqûre au bout du doigt pour les décisions de traitement du diabète.

Le système est conçu pour :

- Fournir les valeurs du taux de glucose en temps réel.
- Donner des informations sur la tendance de variation du taux de glucose.
- Donner l'alerte pour détecter et prévoir des épisodes d'hypoglycémie (glucose trop faible) ou d'hyperglycémie (glucose trop élevé).
- Aider à la prise en charge du diabète.

Les données de l'historique fournies par le système peuvent être interprétées pour aider à ajuster le traitement thérapeutique. Ces ajustements doivent être basés sur des cycles et des tendances qui apparaissent dans le temps. Ce système est destiné à être utilisé sur un seul patient.

Informations relatives à la sécurité de l'IRM

Un patient porteur de ce dispositif peut passer un examen en toute sécurité dans un scanner à résonance magnétique horizontal à champ fermé respectant les conditions suivantes :

- Champ magnétique statique de 1,5 T ou 3,0 T.
- Gradient de champ spatial maximal de 1 900 gauss/cm (≤ 19 T/m).
- Système d'IRM maximum rapporté, débit d'absorption spécifique (SAR) moyen corps entier de 4 W/kg (mode de fonctionnement contrôlé de premier niveau) pendant 15 minutes d'exploration continue, ou SAR de 2 W/kg pendant 30 minutes d'exploration continue.

Dans les conditions d'exploration définies ci-dessus, les résultats de tests non cliniques indiquent que le capteur Eversense E3 est supposé produire une hausse de température maximale de 5,4 °C.

Dans des tests non cliniques, l'artéfact d'image issu du dispositif s'étend à environ 72 mm (2,83 pouces) du capteur Eversense E3 pour une imagerie avec une séquence d'impulsions en écho de gradient et un système d'IRM 3 T.

Le capteur Eversense E3 n'a pas été testé dans des systèmes d'IRM ne respectant pas les conditions indiquées ci-dessus. L'exposition du capteur Eversense E3 à des conditions d'IRM différentes des conditions indiquées ci-dessus peut provoquer des complications potentielles, telles qu'une migration du dispositif, un réchauffement et des dommages sur les tissus ou une érosion par la peau.

Le Smart Transmetteur Eversense E3 est incompatible avec la résonance magnétique et DOIT ÊTRE RETIRÉ avant de passer une IRM. Vous devez informer le personnel qui réalise l'IRM que vous portez un Smart Transmetteur et un capteur Eversense E3 et consulter le professionnel de santé qui a inséré votre capteur.

Vous trouverez la version la plus récente de l'étiquetage du système MGC Eversense E3 à l'adresse <https://global.eversensedibabetes.com>. Vous recevrez une carte d'implantation internationale de votre professionnel de santé pour chaque capteur inséré. Conservez cette carte dans votre portefeuille.

Contre-indications

Le système est contre-indiqué pour les patients pour lesquels la dexaméthasone ou l'acétate de dexaméthasone sont contre-indiqués.

Le Smart Transmetteur est incompatible avec les procédures d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Aucun patient ne doit faire une IRM alors qu'il porte le Smart Transmetteur. Vous trouverez des informations sur le capteur à la section *Informations relatives à la sécurité de l'IRM*.

Lorsqu'ils sont administrés par intraveineuse ou en tant que composants d'une solution d'irrigation ou d'une solution de dialyse péritonéale, le mannitol et le sorbitol peuvent augmenter les concentrations de mannitol et de sorbitol dans le sang et générer des valeurs élevées erronées du taux de glucose du capteur. Le sorbitol est utilisé dans certains édulcorants artificiels et les niveaux de concentration des apports nutritionnels typiques n'ont pas d'incidence sur les taux de glucose détectés par le capteur.

Éléments du kit

Le kit du Smart Transmetteur Eversense E3 contient les éléments suivants :



Smart Transmetteur Eversense E3



Chargeur



Alimentation
(Votre kit Smart Transmetteur inclut une prise murale adaptée à votre pays.)

Ce kit contient aussi ce *Guide de l'utilisateur* et un *Guide de référence rapide*.

Comment utiliser ce Guide

Ce Guide décrit comment utiliser votre système MGC. Lisez-le entièrement avant d'utiliser votre système.

- Tous les **avertissements** et toutes les **mis en garde** apparaissent dans des encarts à fond coloré.
- Les conseils donnés à l'utilisateur sont précédés du symbole ✓.

2. Avantages et risques

Cette section décrit les avantages, les attentes et les risques associés à l'usage du système E3 MGC Eversense. Vous trouverez des informations supplémentaires relatives à la sécurité à l'adresse <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> (base de données européenne sur les dispositifs médicaux, EUDAMED) dans le résumé de la sécurité et des performances (SSCP) du système MGC Eversense E3 ou auprès du support clientèle sur demande. Ce SSCP est associé aux numéros UDI-DI de base des composants du système MGC Eversense E3, qui sont indiqués au dos de ce manuel d'instructions.

La mesure continue du taux de glucose (MGC) contribue à la prise en charge du diabète et au contrôle de la glycémie et peut, à ce titre, améliorer votre qualité de vie. Bien connaître les avantages et les risques d'utilisation du système Eversense, comprendre la procédure d'insertion et respecter les précautions d'usage permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Ne faites pas procéder à l'insertion du capteur si vous n'êtes pas en mesure de faire fonctionner le système MGC correctement.

Le système MGC mesure le taux de glucose du liquide interstitiel, entre les cellules du corps. Les différences physiologiques qui existent entre le liquide interstitiel et le sang (obtenu par piqûre au doigt) peuvent être à la source des écarts de valeurs entre le taux de glucose interstitiel et la glycémie. Ces différences sont surtout apparentes durant les périodes au cours desquelles la glycémie varie rapidement (par ex., après avoir mangé, après une injection d'insuline ou après avoir fait de l'exercice), et pour certaines personnes, pendant les premiers jours suivant l'insertion en raison de l'inflammation pouvant résulter de la procédure d'insertion. Il existe un temps de latence de l'ordre de plusieurs minutes entre un résultat obtenu au niveau capillaire (par piqûre au doigt) et un résultat obtenu à partir du liquide interstitiel.

IMPORTANT : si vos symptômes ne correspondent pas aux alertes et relevés de glucose du système MGC Eversense E3, une mesure de glycémie par piqûre au bout du doigt avec un lecteur de glycémie domestique doit être réalisée avant de prendre des décisions de traitement.

Une utilisation du système MGC Eversense E3 non conforme au mode d'emploi peut vous faire manquer un événement d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie et entraîner une blessure.

Le capteur comporte un anneau en silicone qui contient une petite quantité d'anti-inflammatoire (l'acétate de dexaméthasone). Il n'a pas été déterminé si les risques habituellement associés à l'usage d'acétate de dexaméthasone injectable s'appliquent à l'usage de l'anneau d'éluion qui se trouve dans le capteur. L'anneau d'éluion libère une petite quantité d'acétate de dexaméthasone lorsque le capteur entre en contact avec des liquides du corps et sert à limiter la réponse inflammatoire du corps au capteur inséré. L'acétate de dexaméthasone de l'anneau peut aussi causer des effets indésirables graves qui sont inconnus à ce jour lorsque ce médicament est administré par injection. Pour obtenir une liste des effets indésirables potentiels liés à l'acétate de dexaméthasone, contactez votre médecin ou professionnel de santé.

Toute modification non autorisée apportée à l'équipement, l'accès illicite à des informations par son intermédiaire le déblocage de votre système ou toute action interdite de ce type risque de le détériorer le système MGC de vous mettre en danger. La modification non autorisée de l'équipement est interdite et annule votre garantie.

Tout incident grave associé à l'utilisation du dispositif devrait être signalé au fabricant et aux autorités compétentes de votre État membre.

Risques et effets indésirables

Les alertes et les notifications relatives aux taux de glucose ne retentiront pas si le son est coupé sur votre appareil mobile. Si le système ne parvient pas à afficher un taux de glucose, il ne peut pas non plus donner d'alertes relatives aux taux de glucose. Si vous ne sentez pas les vibrations du Smart Transmetteur, vous risquez de ne pas être alerté. Si vous êtes en hyperglycémie ou en hypoglycémie et que vous ne vous en rendez pas compte, vous pourriez avoir besoin d'une assistance médicale. Le taux de glucose calculé par le système peut différer légèrement des valeurs obtenues sur votre lecteur de glycémie. Cela explique la raison pour laquelle l'alerte pourrait s'activer à un moment différent de celui qui avait été paramétré initialement.

IMPORTANT : si vous ne vérifiez pas votre glycémie avec un lecteur alors que vos symptômes ne correspondent pas aux valeurs du taux de glucose obtenues, vous pourriez passer à côté d'une hyperglycémie ou d'une hypoglycémie.

Les décisions en matière de traitement doivent reposer sur un examen des éléments suivants : valeur de glucose du capteur, flèche de tendance, graphe de tendance du glucose récent et alertes/notifications du système. Vous ne devez pas prendre de décision de traitement si vous n'avez pas tenu compte de toutes ces informations. Vous devez parler avec votre professionnel de santé de l'action de l'insuline afin de comprendre comment tenir compte de son impact sur votre taux de glucose pour vos décisions de traitement.

Le capteur s'insère en faisant une petite incision et en le plaçant sous la peau. L'implantation peut provoquer une infection, des douleurs, une irritation cutanée, des hématomes, une atrophie ou une décoloration de la peau. Des vertiges, des évanouissements et des nausées ont été signalés dans peu de cas pendant les études cliniques, de même que des ruptures de capteurs ou des échecs du retrait au premier essai. De plus, l'adhésif peut causer une allergie ou une irritation de la peau. Tout problème médical associé à la procédure ou à l'utilisation du dispositif devrait être signalé à votre professionnel de santé. Le capteur nécessitera une procédure de retrait supplémentaire à la fin de la durée de vie du capteur.

Avertissements

- Le système MGC Eversense E3 a été testé uniquement sur des sites d'insertion situés sur le bras.
- Si vos symptômes ne correspondent pas aux valeurs du taux de glucose obtenues, vous devez tester votre glycémie à l'aide d'un lecteur.
- Avant de prendre une décision de traitement, vous devez tenir compte de la valeur de glycémie du capteur, du graphique de tendance, de la flèche de tendance et de toute alerte du système MGC Eversense E3. Si aucune flèche de tendance n'apparaît, le système n'a pas assez de données pour afficher le sens et la vitesse de variation. Vous ne devez pas prendre de décision de traitement reposant uniquement sur la valeur de glycémie du capteur.
- Si votre Smart Transmetteur est endommagé ou fissuré, NE L'UTILISEZ PAS. Il représente un danger électrique, peut se mettre à mal fonctionner, voire à vous donner des décharges électriques.
- Lorsqu'il est soumis à des interférences électromagnétiques (EMI) directes et rapprochées, votre Smart Transmetteur peut avoir des problèmes pour envoyer les données à votre appareil mobile. Éloignez-vous de la source des EMI et vérifiez que votre appareil mobile est connecté à votre Smart Transmetteur.
- Les antibiotiques de la classe des tétracyclines peuvent générer des taux de glucose bas erronés au niveau du capteur. Vous ne devez pas vous fier aux valeurs de glycémie du capteur lorsque vous prenez des tétracyclines.
- Le bandage doit recouvrir l'incision pendant 48 heures car il s'agit d'une norme de soin afin de permettre la formation d'un joint étanche pour renforcer la protection contre les infections. En attendant sa cicatrisation, couvrez le site d'insertion d'un pansement stérile avant de placer l'adhésif du Smart Transmetteur sur le capteur. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une infection du site d'insertion.
- Passez en revue le Guide de l'utilisateur avec votre professionnel de santé. Adressez vos questions ou les problèmes rencontrés avec un produit Eversense E3 au Support clientèle. L'appel de ce service est gratuit aux États-Unis : 844-SENSE4U (844-736-7348). En dehors des États-Unis, appelez votre distributeur local ; au besoin, allez à la page <https://global.eversensediatetes.com> pour le localiser.

Avertissements (suite)

- Étalonnez toujours le système à partir d'un échantillon sanguin obtenu par piqûre au doigt. **N'UTILISEZ PAS** une gouttelette de sang provenant d'un autre site (comme l'avant-bras ou la paume de la main) pour mesurer la glycémie avec le lecteur et étalonner le système.
- En cas de port de pompe à insuline, **NE PAS INSÉRER** le cathéter ni injecter de l'insuline à moins de 10,16 cm (4 po) du site d'insertion du capteur. Si le site d'injection de l'insuline est à moins de 10,16 cm (4 po) du site d'insertion du capteur, les valeurs du taux de glucose données par le capteur peuvent être faussées.
- Suivez toujours les instructions de soins de votre médecin ou professionnel de santé après l'insertion ou le retrait d'un capteur. Contactez votre professionnel de santé si l'un des événements suivants se produit :
 - Vous ressentez une douleur, une rougeur ou un gonflement au niveau du ou des sites d'incision plus de 5 jours après avoir l'insertion ou le retrait du capteur ou si l'incision n'a pas guéri dans les 5 à 7 jours.
- Si votre taux de glucose capteur est très faible (moins de 2,2 mmol/l) ou très élevée (plus de 22,2 mmol/l), vous devez faire un test de glycémie par piqûre au doigt avant de prendre une décision de traitement.
- Le système MGC Eversense E3 nécessite un étalonnage pour fournir des valeurs précises. Vous ne devez pas utiliser les valeurs MGC pour prendre des décisions de traitement avant d'avoir suivi les instructions pour l'étalonnage quotidien.
- Le système MGC Eversense E3 ne fournira pas de valeurs pendant la phase d'acclimatation de 24 heures ni avant un deuxième étalonnage réussi au cours de la phase d'initialisation. Pendant ce temps, vous devez contrôler votre glycémie à l'aide de votre système de surveillance de la glycémie.
- Certaines conditions et alertes empêchent l'affichage des données de glycémie. Vous devez alors utiliser votre système de surveillance de la glycémie pour prendre des décisions de traitement. Vous devez lire attentivement la section *Alertes et notifications* du *Guide de l'utilisateur du système MGC Eversense E3* pour comprendre ces conditions.

Avertissements (suite)

- Les alertes et les notifications relatives aux taux de glucose ne retentiront pas si le son est coupé sur votre appareil mobile. Si le système ne parvient pas à afficher un taux de glucose, il ne peut pas non plus donner d'alertes relatives aux taux de glucose. Si vous ne sentez pas les vibrations du Smart Transmetteur, vous risquez de ne pas être alerté.
- Lorsque le Smart Transmetteur n'est pas porté au-dessus du capteur, comme pendant le chargement, le système MGC Eversense E3 ne fournit pas d'alerte ni de notification sur l'appareil mobile ni d'alertes au moyen de vibrations du Smart Transmetteur.
- Si vous êtes allergique à l'un des matériaux utilisés dans le capteur ou le Smart Transmetteur, détaillés dans les spécifications techniques du présent guide de l'utilisateur, n'utilisez PAS le système MGC Eversense.

Mises en garde

- **N'ÉCHANGEZ PAS** vos Smart Transmetteurs avec un autre patient. Chaque Smart Transmetteur ne peut être relié qu'à un seul capteur à la fois. Le système doit être utilisé par une personne à domicile.
- Les thérapies ou procédures médicales suivantes peuvent causer des dommages permanents au capteur, en particulier s'ils sont utilisés à proximité de l'appareil :
 - **Lithotritie** – Le traitement par lithotritie n'est pas recommandé pour les personnes chez qui on a implanté un capteur, parce que les effets de cette thérapie sur le capteur sont inconnus.
 - **Diathermie** – **N'UTILISEZ PAS** la diathermie chez les personnes chez qui on a implanté un capteur. L'énergie provenant de la diathermie peut passer dans le capteur et causer des atteintes sur les tissus de la zone d'insertion.
 - **Électrocautérisation** – L'usage de l'électrocautérisation à proximité du site d'insertion du capteur risque d'endommager ce dernier. **N'UTILISEZ PAS** d'appareil d'électrocautérisation à proximité du capteur.
- **Usage des stéroïdes** – Il n'a pas été déterminé si les risques habituellement associés à l'usage d'acétate de dexaméthasone injectable s'appliquent à l'usage d'un anneau d'élution d'acétate de dexaméthasone, dispositif permettant d'administrer une substance de manière très localisée et contrôlée. L'anneau d'acétate de dexaméthasone pourrait causer d'autres effets indésirables qui sont encore inconnus.

Mises en garde (suite)

- **NE PORTEZ PAS** le Smart Transmetteur sur vous si vous devez faire pratiquer des radios ou un scanner tomodensitométrie. Pour éviter toute interférence avec les résultats, retirez le Smart Transmetteur avant toute radio ou scanner. Informez votre professionnel de santé de la présence de votre Smart Transmetteur.
- Le capteur et le Smart Transmetteur doivent être reliés le jour où le capteur est inséré. Si le capteur et le Smart Transmetteur ne sont pas reliés, vous pourriez retarder la réception de vos résultats de taux de glucose.
- Si le capteur, le site d'insertion ou le Smart Transmetteur est chaud, retirez-le immédiatement et contactez votre professionnel de santé pour prendre conseil. Un capteur chaud peut indiquer la présence d'une infection ou d'un dysfonctionnement du capteur.
- **N'ESSAYEZ PAS** d'utiliser l'application Eversense App alors que vous êtes au volant d'un véhicule.
- Ne vous faites pas masser à proximité du site d'insertion d'un capteur. Un massage près du capteur risque d'être inconfortable ou de causer une irritation de la peau.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur d'alimentation CA et le câble USB qui vous ont été fournis avec le Smart Transmetteur lorsque vous chargez ce dernier. L'usage d'une autre alimentation pourrait endommager le Smart Transmetteur, empêchant une réception fiable des valeurs du taux de glucose, créer un risque d'incendie, et annuler la garantie. Si l'adaptateur d'alimentation CA ou le câble USB Eversense est endommagé ou s'il est perdu, contactez le support clientèle afin d'en obtenir le remplacement et de garantir le fonctionnement sans danger du dispositif.
- Si vous avez des inquiétudes particulières en ce qui concerne les allergies aux produits adhésifs contenant du silicone, contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce dispositif. Jetez les patchs adhésifs Eversense après chaque utilisation ou au bout de 24 heures au maximum.
- **NE changez PAS** l'unité de mesure sans en avoir discuté avec votre professionnel de santé. L'utilisation d'une mauvaise unité de mesure peut faire manquer un événement d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.

- L'entrée de valeurs de glycémie incorrectes pour l'étalonnage peut produire des valeurs de glycémie imprécises et vous faire manquer un événement d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.
- Suivez la recommandation de votre professionnel de santé pour définir les alertes de taux de glucose. Une mauvaise définition de vos alertes de taux de glucose peut vous faire manquer un événement d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.
- Faites attention aux alertes de taux de glucose du système. Une réaction inappropriée à une alerte peut vous faire manquer un événement d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.
- L'application de suivi du glucose à distance Eversense NOW ne remplace pas le suivi indiqué par votre professionnel de santé.
- Le système MGC Eversense E3 n'a pas été testé sur les populations suivantes : femmes enceintes ou en phase d'allaitement, personnes de moins de 18 ans, gravement malades ou hospitalisées, personnes recevant une immunosuppression thérapeutique, une chimiothérapie, ou un traitement anticoagulant, personnes portant un autre dispositif implantable actif comme un défibrillateur implantable (les implants passifs, comme les endoprothèses coronaires ne posent pas problème), celles qui ont des allergies connues aux glucocorticoïdes systémiques ou qui les utilisent (à l'exclusion des préparations topiques, optiques ou nasales, mais sans exclure les glucocorticoïdes systémiques inhalés). La précision du système n'a pas été testée chez ces populations et les valeurs de glycémie du capteur peuvent être imprécises et faire manquer un événement grave d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.
- L'Apple Watch est un affichage secondaire des données MGC Eversense E3. Elle ne remplace en aucun cas l'affichage principal MGC Eversense E3.

3. Prise en main

Cette section décrit les étapes requises pour faire le démarrage initial qui vous permettra d'utiliser votre nouveau système MGC Eversense E3 tous les jours. Vous pouvez réaliser ces étapes avant que votre professionnel de santé ne vous insère le capteur.

Pour commencer, il faut :

- Votre appareil mobile sur lequel vous avez téléchargé l'application Eversense App.
- Une connexion Internet sans fil.
- Le Smart Transmetteur Eversense E3 qui son alimentation (tous deux contenus dans la boîte).

Remarque : si vous n'avez pas reçu la boîte de votre Smart Transmetteur, passez directement aux instructions sur le téléchargement et l'installation de l'application Eversense App sur votre appareil mobile dans cette section.

Vous pouvez effectuer les étapes de mise en route avant que votre capteur ne soit inséré, de manière à vous familiariser avec le système.

2 étapes simples pour la mise en route :

1. Téléchargez l'application Eversense App sur votre appareil mobile.
2. Configurez l'application – Créez un compte, faites le jumelage, paramétrez.

Une fois que vous recevez votre Smart Transmetteur, il doit être entièrement chargé avant de pouvoir le jumeler avec l'application.

Remarque : votre Smart Transmetteur est réglé sur l'état « Sommeil » pour l'envoi. Lorsque vous chargez le Smart Transmetteur pour la première fois, son état passe à « Actif ».

Votre Smart Transmetteur bénéficie d'une garantie de 12 mois. Le système vous alerte lorsque la garantie du transmetteur dépasse 365 jours.

Charger votre Smart Transmetteur


Il est important de charger le Smart Transmetteur chaque jour pour s'assurer que les données soient recueillies sur le capteur et envoyées à l'application. Le Smart Transmetteur ne recueille pas d'information sur le capteur et n'en envoie pas à l'application pendant la charge. Vous pouvez aussi recharger votre Smart Transmetteur en connectant le câble USB au port USB d'un ordinateur, au lieu d'utiliser un adaptateur d'alimentation CA. Si vous rechargez la pile par ordinateur, le délai jusqu'à la charge complète pourrait être plus long.

Mise en garde : utilisez exclusivement l'adaptateur d'alimentation CA et le câble USB qui vous ont été fournis avec le Smart Transmetteur lorsque vous chargez ce dernier. L'usage d'une autre alimentation pourrait endommager le Smart Transmetteur, empêchant une réception fiable des valeurs du taux de glucose, créer un risque d'incendie, et annuler la garantie. Si l'adaptateur d'alimentation CA ou le câble USB Eversense est endommagé ou s'il est perdu, contactez le support clientèle afin d'en obtenir le remplacement et de garantir le fonctionnement sans danger du dispositif.

1. Branchez l'extrémité standard du câble USB dans l'adaptateur sur le port USB.



2. Branchez l'extrémité micro du câble USB dans le chargeur sur le port USB.

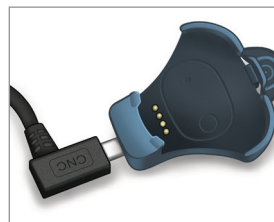


3. Alignez les quatre broches dorées qui sont au bas du Smart Transmetteur avec les quatre broches dorées du chargeur.

- Faites glisser le Smart Transmetteur en place dans le chargeur.
- Une fois qu'il est en place, poussez sur le Smart Transmetteur vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



4. Branchez l'adaptateur dans une prise secteur.

- Une fois le Smart Transmetteur entièrement chargé, un petit voyant à DEL vert apparaît en haut à l'avant du Smart Transmetteur (au-dessus du bouton de mise en marche).
- Débranchez l'alimentation du Smart Transmetteur une fois qu'il est entièrement chargé.
- Pour retirer le Smart Transmetteur du chargeur, tirez sur la languette et soulevez le Smart Transmetteur afin de le sortir du chargeur.

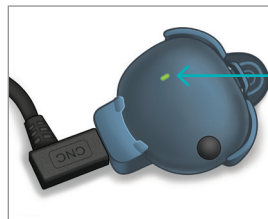

DEL
(s'allume en vert
ou en orange)

Étape 1. Télécharger et installer l'application

3

Application, télécharger

1. Sélectionnez l'appareil mobile sur lequel vous voulez afficher les valeurs de votre taux de glucose. Le plus souvent, il s'agit d'un smartphone.



2. Téléchargez l'application gratuite Eversense App sur l'Apple App Store ou sur Google Play.

Les indications durant l'installation diffèrent en fonction du système d'exploitation utilisé : iOS ou Android.



Icône de l'application Eversense App

Remarque : assurez-vous que votre appareil mobile utilise le dernier système d'exploitation compatible avec Eversense.

3. Sur l'écran d'installation, touchez **Installer** l'application et suivez les instructions d'installation.

Au bout de 1 à 2 minutes, vérifiez que l'icône de l'application Eversense App apparaît sur votre appareil mobile (voir ci-contre à gauche).

Autorisez-vous « Eversense CGM » à vous envoyer des notifications ?

Les notifications peuvent inclure des alertes, des sons et des pastilles d'icônes. Vous pouvez les configurer dans Réglages.

[Refuser](#)

[Autoriser](#)

Remarque : veuillez à Autoriser les notifications de l'application Eversense App pour recevoir des alertes et notifications de votre appareil mobile.

IMPORTANT : assurez-vous de disposer d'une connexion Internet sans fil, que la date et l'heure sont correctes sur votre appareil mobile et que le Bluetooth est activé avant de continuer.

Étape 2. Configurer l'application - Création du compte, jumelage et paramétrage

3

Une fois que l'application est téléchargée, connectez-la au Smart Transmetteur en le reliant à votre appareil mobile.

1. Lancez l'application en touchant l'icône Eversense App sur votre appareil mobile. La version intégrale de la LICENCE D'EXPLOITATION POUR L'UTILISATEUR FINAL s'affiche.

- Lisez et touchez **Accepter**.



Ayant lu la Politique de confidentialité et cliqué sur le bouton « Accepter », je donne mon consentement au traitement de mes données de santé afin qu'elles soient utilisées par Senseonics pour la fourniture et l'utilisation des Produits et Services de Senseonics.

Annuler

Accepter

2. Après avoir accepté le contrat, vous serez invité à créer et enregistrer un compte avec un e-mail et un mot de passe.

- Vous devez avoir enregistré un compte pour pouvoir vous connecter au système. Touchez **Créer un compte**.

Aucun transmetteur connecté

Retour eversense

Email

Mot de passe

[Créer un compte](#) [Mot de passe oublié](#)

SE CONNECTER

[Supprimer le compte](#)

Remarque : si vous avez déjà un compte et vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser via l'application. Si vous oubliez votre e-mail associé à votre compte, accédez à **Menu principal > À propos > Mon compte**.

3. Entrez les informations de votre compte et touchez **Soumettre**.

- Touchez **Terminé** pour retourner à l'écran de connexion à Eversense.



The screenshot shows a mobile browser interface for creating an account on the website ouspilot.eversensedms.com. The page features the Eversense logo at the top, followed by a language selector set to 'French'. Below this is a progress bar and the heading 'Créer un compte'. The form includes several input fields: 'Prénom' (First name), 'Nom' (Last name), 'E-mail' (Email address, with 'exemple@email.com' as a placeholder), 'Créer un mot de passe' (Create a password, with 'Eg. abc@1A' as a placeholder), and 'Confirmez votre mot de passe' (Confirm your password, with 'Eg. abc@1A' as a placeholder). A blue 'Suivant' (Next) button is positioned at the bottom right of the form. At the very bottom, there is a link for users who already have an account: 'Vous avez déjà un compte ? Veuillez accéder à [Se connecter](#)'.

4. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **SE CONNECTER**. Un écran de confirmation apparaît. Tapez sur **OK**.


Remarque : le mot de passe est sensible à la casse.



5. Lorsque vous terminez l'inscription et vous connectez, un écran BIENVENUE apparaît.



6. Choisissez l'une des deux options suivant que vous ayez déjà votre Smart Transmetteur ou non :


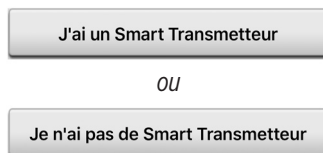


OU

(passez à l'étape 12).

Les utilisateurs Android doivent activer les services de localisation.

- Touchez **OK** pour confirmer que l'autorisation des services de localisation pour la connexion Bluetooth est obligatoire.
- Touchez ensuite **Autoriser** pour vous assurer de recevoir des alertes lorsque l'application est en cours d'utilisation ou en arrière-plan.

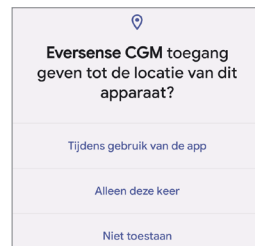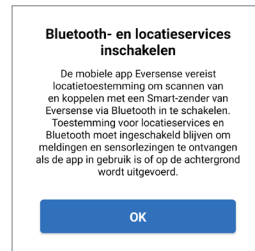

Remarque : Android OS 12 et versions supérieures peuvent présenter une fenêtre contextuelle de demande d'autorisation différente.



7. Le Smart Transmetteur étant en marche, lorsque l'écran **JUMELER VOTRE TRANSMETTEUR** apparaît sur votre appareil mobile, placez votre Smart Transmetteur en mode de détection afin que l'appareil mobile le trouve :

- Appuyez trois fois sur le bouton de mise en marche du Smart Transmetteur. Assurez-vous que votre Smart Transmetteur n'est pas branché pour sa recharge.
- La DEL clignote en vert et en orange pour indiquer que le Smart Transmetteur est en mode de détection.



Remarque : si vous appuyez sur le bouton de mise en marche sur le Smart Transmetteur et qu'aucune DEL n'apparaît, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant environ 5 secondes pour allumer le transmetteur.

8. Sur l'écran **JUMELER VOTRE TRANSMETTEUR**, l'ID du Smart Transmetteur que votre application a détecté s'affiche avec la mention « Non connecté ». (L'ID de votre Smart Transmetteur correspond au numéro de série qui se trouve sur sa face arrière.)


- Touchez **Non connecté** pour lancer le jumelage.



9. Un écran **DEMANDE DE JUMELAGE BLUETOOTH** apparaît.

- Touchez **Jumeler** pour terminer le processus de jumelage.

Remarque : le Smart Transmetteur ne peut être jumelé qu'avec un appareil mobile à la fois.

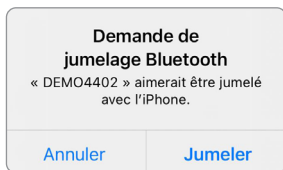


10. Une fois le jumelage terminé, « Connecté » apparaît à côté de l'ID du Smart Transmetteur. Le Smart Transmetteur se met à vibrer par intermittence jusqu'à ce que le Smart Transmetteur soit relié au capteur inséré (voir *Insérer et relier le capteur*).

- Touchez **Suivant**.



11. L'écran **UNITÉ DE MESURE** apparaît et indique l'unité de mesure standard pour votre région. Vos valeurs du taux de glucose s'afficheront toujours dans cette unité de mesure.
- Lorsque l'unité de mesure est confirmée, touchez **Terminer**.

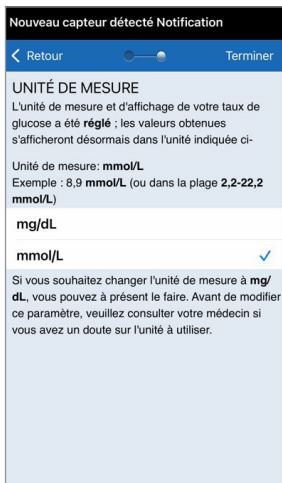

Mise en garde : NE changez PAS l'unité de mesure sans en avoir discuté avec votre professionnel de santé.

12. Touchez les écrans d'introduction qui indiquent quand prendre des décisions de traitement avec le système MGC Eversense E3.

3

Aucun transmetteur connecté

••••• Suivant



Bienvenue l'application mobile Eversense MGC.

Cette brève introduction vous aidera à comprendre quand utiliser le système MGC pour prendre des décisions de traitement.

Vous devez utiliser votre lecteur pour prendre des décisions de traitement avant de comprendre l'impact de la durée d'action de l'insuline sur votre glycémie dans différentes situations.

Vous trouverez dans votre Guide de l'utilisateur du système MGC Eversense des informations complètes sur la prise de décisions de traitement avec votre système MGC.

Aucun transmetteur connecté

< Retour ••••• Suivant

Décisions de traitement OK
Prenez une décision de traitement lorsque TOUTES les informations ci-dessous sont disponibles.



Barre d'état

Taux de glucose

Flèche de tendance


Informations sur les tendances récentes et alertes

Aucun transmetteur connecté

< Retour ••••• Suivant

Les symptômes ne correspondent pas avec l'application ?
Si vos symptômes ne correspondent pas avec ce que vous voyez sur l'application mobile MGC Eversense, utilisez votre lecteur de glycémie pour confirmer avec un contrôle par piqûre au doigt avant de prendre une décision de traitement.

En cas de doute, réalisez un contrôle par piqûre au doigt avec votre lecteur de glycémie.




Aucun transmetteur connecté


< Retour ••••• Suivant

La décision de traitement n'est pas correcte
Vous ne devez pas prendre de décision de traitement quand :

Aucun taux de glucose n'est affiché - aucune mesure n'est disponible.

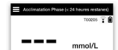

Le taux de glucose est affiché en gris - données insuffisantes pour afficher une flèche de tendance.




Aucun transmetteur connecté

< Retour ••••• Terminé


Résumé
Devriez-vous prendre une décision de traitement ?

Oui.




Non. Les symptômes ne correspondent pas avec l'application.

Non.



Non.



13. L'écran **MON GLUCOSE** apparaît alors.
L'écran ne comporte aucune valeur pour le moment.



Une fois que le capteur a été inséré par un professionnel de santé et que la phase d'initialisation de 24 heures est terminée, vous pouvez commencer l'étalonnage. Si vous ne vous êtes pas encore fait insérer votre capteur, vous pouvez étudier ce Guide de l'utilisateur pour vous familiariser avec l'application et ses fonctions.

Icônes de connexion du Smart Transmetteur

3



Lorsque l'icône est une goutte de sang grise avec un X, aucun Smart Transmetteur n'est détecté. Vous verrez cette icône avant de jumeler votre Smart Transmetteur à votre application mobile et lors de chaque interruption de la connexion BLE entre le Smart Transmetteur et votre application mobile.



Lorsque l'icône est une goutte de sang rouge avec un X, aucun capteur n'est détecté. Vous verrez cette icône avant de relier un capteur à votre transmetteur et à chaque fois qu'un capteur relié ne peut pas être détecté par le transmetteur.



Lorsque l'icône est une goutte de sang grise ou noire avec des barres au-dessus, la connexion NFC entre le capteur et le Smart Transmetteur a été établie.



Les barres indiquent la puissance de la connexion. Les informations de puissance du signal apparaissent aussi dans l'application Eversense App sous **Menu principal** >

Guide de placement.



Rappel : vous ne pouvez pas établir de liaison avec un capteur tant que votre transmetteur n'est pas jumelé avec l'application Eversense App.



4. Relier le capteur

Cette section décrit comment relier le capteur et le Smart Transmetteur pour la première fois après que votre médecin ou professionnel de santé a inséré le capteur. Le capteur ne peut être inséré que par votre médecin ou professionnel de santé. Voir « À propos du capteur » pour plus de détails.


Une fois que votre médecin ou professionnel de santé a inséré le capteur, il doit être relié au Smart Transmetteur afin de démarrer la phase d'acclimatation de **24 heures**. Votre Smart Transmetteur ne peut être relié qu'à un seul capteur à la fois. Il est inutile de porter le Smart Transmetteur pendant la phase d'acclimatation.

IMPORTANT : veuillez lire cette section complète avant de relier votre capteur.


Vous pouvez relier votre capteur au Smart Transmetteur à tout moment après l'insertion du capteur et le jumelage du Smart Transmetteur avec l'application Eversense App. Pour relier le capteur, votre appareil mobile doit être connecté à Internet et votre transmetteur doit être chargé, activé et jumelé avec votre appareil mobile.

Le site d'incision est fermé par des Steri-Strips et un bandage adhésif, tel que Tegaderm, est placé au-dessus. Il est important de comprendre comment positionner le Smart Transmetteur sur le capteur pour pouvoir le relier. Le Smart Transmetteur doit être centré sur le capteur comme illustré.


IMPORTANT : votre professionnel de santé complètera une carte d'implant au moment de votre insertion. Veuillez conserver cette carte dans votre portefeuille et la remplacer lorsque vous recevez une nouvelle carte après une nouvelle insertion.

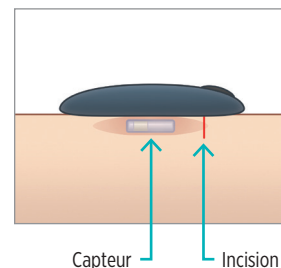

Lorsque vous reliez le capteur pour la première fois avec le bandage Tegaderm au-dessus du site d'insertion, l'incision est probablement au centre du Tegaderm. Cela signifie que le capteur est probablement au-dessus du centre du Tegaderm.

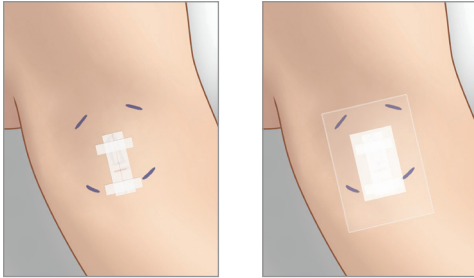


Lorsque vous reliez le capteur pour la première fois, n'utilisez pas de patch adhésif Eversense sur le Smart Transmetteur. Lorsque vous positionnez le Smart Transmetteur au-dessus du capteur, il devrait être légèrement au-dessus du centre du patch Tegaderm.

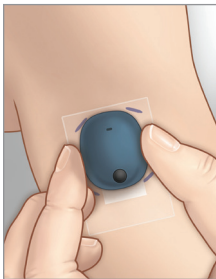


1. Vérifiez que votre Smart Transmetteur est en marche (voir *Utiliser le Smart Transmetteur*) et que votre appareil mobile a accès à Internet.

- Positionnez le Smart Transmetteur juste au-dessus du capteur inséré jusqu'à ce que le **Guide de placement** dans l'application affiche une connexion et maintenez-le en place sans appuyer. La page Guide de placement se trouve dans **Menu > Guide de placement**.

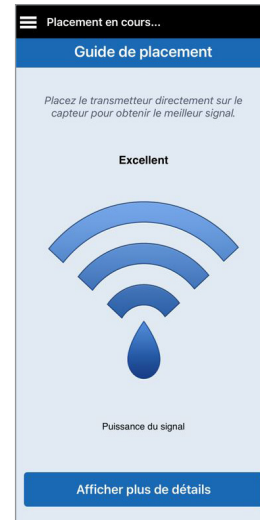


2. Quittez la page Guide de placement pour revenir à l'écran Menu principal après avoir confirmé la présence d'un signal.


Remarque : la connexion entre le capteur et le transmetteur est sensible à l'orientation du transmetteur. Si le Smart Transmetteur est directement au-dessus du capteur et que le Guide de placement indique qu'il n'y a pas de connexion, essayez de faire tourner le Smart Transmetteur légèrement vers la gauche ou la droite de manière à ce que le transmetteur soit centré verticalement au-dessus du capteur.

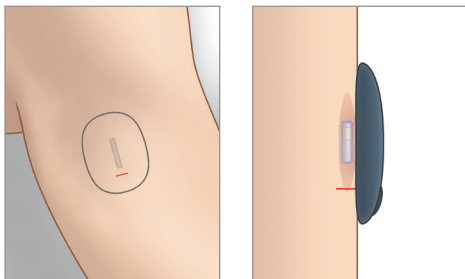

3. Pour relier le Smart Transmetteur et le capteur, touchez **Relier capt.** sur l'écran contextuel **Nouveau capteur détecté** ou en touchant **Menu > Paramètres > Système > Capteur relié et Relier le capteur détecté.**

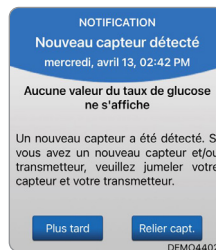

Remarque : cela peut prendre jusqu'à 5 minutes pour que la notification Nouveau capteur détecté s'affiche.

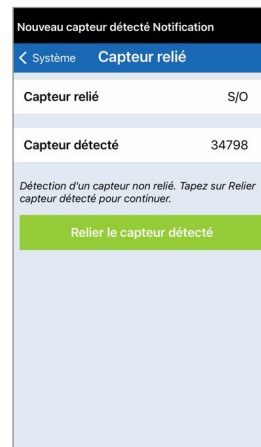

4. Le jumelage commence. Chaque étape est cochée lorsqu'elle est terminée. Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à 10 minutes. **N'ENLEVEZ PAS** votre transmetteur de son emplacement tant que la troisième étape n'a pas été confirmée.

| Initialisation Phase (4 étalonnages restants) | |
|---|---------|
| Capteur relié | Terminé |
| Capteur relié | 34798 |
| Capteur détecté | 34798 |
| 1. Récupération des données du ca... ✓ | |
| 2. Liaison au capteur : 34798 ✓ | |
| 3. Jumelage terminé ✓ | |

Placez le transmetteur sur le capteur pour achever le jumelage. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.

OK

Si le Smart Transmetteur est retiré du site du capteur, le système affiche une notification.

| Remplacement du transmetteur Alerte | |
|--|---------------|
| < Système | Capteur relié |
| Capteur relié | S/O |
| Capteur détecté | 34798 |
| <p><i>Votre transmetteur est arrivé à expiration et ne peut pas fournir de valeurs du taux de glucose ni établir une connexion avec un capteur. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</i></p> | |
| <p>Relier le capteur détecté</p> | |


Si votre Smart Transmetteur a expiré, vous ne pouvez pas le relier à un capteur.

Une fois le capteur relié, vous pouvez retirer le Smart Transmetteur et le placer dans le chargeur pendant les 24 heures suivantes. Pour savoir comment utiliser votre système après la phase d'acclimatation, consultez la section, *Utiliser le Smart Transmetteur*.

Mise en garde : le capteur et le Smart Transmetteur doivent être reliés le jour où le capteur est inséré. Si le capteur et le Smart Transmetteur ne sont pas reliés, vous pourriez retarder la réception de vos résultats de taux de glucose.


Remarque : Le capteur nécessite une phase d'acclimatation de 24 heures pour se stabiliser dans votre corps avant que le Smart Transmetteur puisse collecter les valeurs du taux de glucose. Durant la phase d'acclimatation, vous n'avez pas besoin de porter le Smart Transmetteur. Si vous décidez de porter le Smart Transmetteur sur le capteur durant cette période, un message s'affichera dans l'application vous indiquant que la phase d'acclimatation est en cours. Une fois la phase d'acclimatation terminée, mettez en marche le Smart Transmetteur et placez-le au-dessus du capteur avec le patch adhésif Eversense. Le système vous réclamera un étalonnage à l'aide de l'application.

Avertissement : le système MGC Eversense E3 ne fournira pas de valeurs pendant la phase d'acclimatation de 24 heures ni avant un deuxième étalonnage réussi au cours de la phase d'initialisation. Pendant ce temps, vous devez contrôler votre glycémie à l'aide de votre système de surveillance de la glycémie.

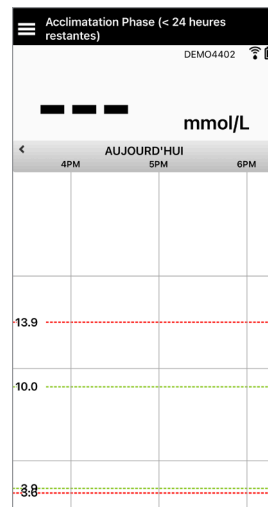

IMPORTANT : après la phase d'acclimatation de **24 heures**, si votre Smart Transmetteur n'est pas mis en marche et porté sur le capteur, le système ne peut pas fournir de valeur du taux de glucose après la phase d'acclimatation.



✓ **Conseil** : votre capteur n'est peut-être pas parfaitement perpendiculaire à l'incision. S'il est difficile d'obtenir un signal Bon ou Excellent dans le Guide de placement, N'appuyez PAS. Essayez de faire tourner légèrement le Smart Transmetteur au-dessus du capteur. Attendez environ 1 seconde que le Guide de placement s'actualise entre chaque ajustement de position du Smart Transmetteur au-dessus du capteur.

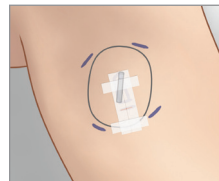

Guide de placement – Écran principal

Vous trouverez ci-dessous les différents niveaux de puissance du signal qui peuvent être affichés.


✓ **Conseil** : vous n'avez pas besoin d'un Excellent signal pour relier le capteur ou utiliser votre système.

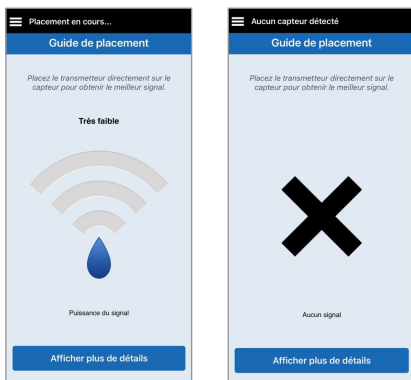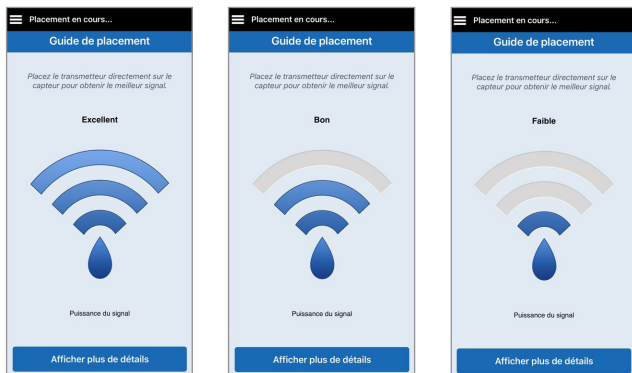

Guide de placement – Écran Afficher plus de détails

Afficher plus de détails fait apparaître une indication de puissance du signal avec une plus haute résolution.

- Cela peut vous aider à bien positionner le transmetteur au-dessus du capteur.

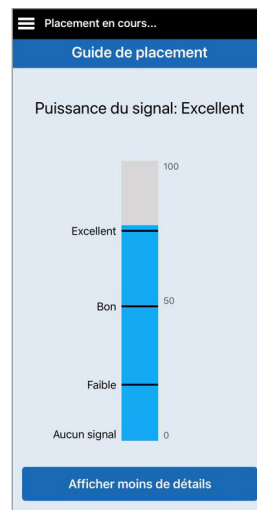

5. Port quotidien du transmetteur

Cette section décrit les nombreuses fonctionnalités du Smart Transmetteur et explique comment obtenir des valeurs du taux de glucose sans interruption et de manière continue.

5

Une fois la phase d'acclimatation terminée, la phase d'initialisation commence et vous êtes prêt à commencer à porter le Smart Transmetteur. Les premiers jours, vous portez le Smart Transmetteur au-dessus du bandage Tegaderm™. Commencez toujours avec un Smart Transmetteur entièrement rechargé. Votre Smart Transmetteur communique avec le capteur et avec l'application pour fournir des informations MGC.

Votre Smart Transmetteur Eversense E3 fait les choses suivantes :

- Il alimente le capteur.
- Il calcule et enregistre les données de glucose.
- Il envoie des alertes vibratoires lorsque vous atteignez des niveaux d'alerte du glucose que vous définissez.
- Il envoie les valeurs du taux de glucose à l'application via Bluetooth.
- Il peut se recharger au moyen du chargeur.
- Il utilise un port USB sur le chargeur pour télécharger des données dans des applications externes compatibles.
- Une DEL multicolore indique les différents modes du Smart Transmetteur.
- Il communique avec l'appareil mobile.
- On peut le mettre en marche et l'arrêter.



Usage quotidien

Pour recevoir les valeurs du taux de glucose et les informations connexes en continu, n'oubliez pas les éléments suivants lorsque vous utilisez votre Smart Transmetteur :

- ✓ Portez sur vous votre Smart Transmetteur à tout moment, sauf pendant qu'il se charge.
- ✓ Le Smart Transmetteur est étanche à une profondeur de 1 mètre (3,2 pieds) pendant 30 minutes. Exposer le Smart Transmetteur à des conditions plus extrêmes que mentionnées ci-dessus risque de l'endommager et annulera la garantie.
- ✓ Assurez-vous que votre Smart Transmetteur soit suffisamment chargé à tout moment.
- ✓ Effectuez un test d'étalonnage de la glycémie lorsque le système vous y invite.
- ✓ Faites attention aux alertes et aux notifications que vous recevez sur votre Smart Transmetteur et sur votre appareil mobile.
- ✓ Remplacez le patch adhésif tous les jours.
- ✓ Vous pouvez retirer le Smart Transmetteur de votre bras à tout moment, sauf durant l'étalonnage. Rappelez-vous qu'aucune donnée n'est collectée tant que votre Smart Transmetteur ne communique pas avec le capteur. Lorsque vous remettez en place le Smart Transmetteur au dessus du capteur, cela peut prendre jusqu'à 10 minutes pour que la communication avec le capteur se rétablisse et pour que les valeurs du taux de glucose apparaissent dans l'application.
- ✓ Lorsque le Smart Transmetteur et l'appareil mobile ne sont pas à portée l'un de l'autre, les données collectées par le Smart Transmetteur sont gardées en mémoire et envoyées à l'application une fois que l'appareil mobile et le Smart Transmetteur se trouvent à nouveau à portée l'un de l'autre.
- ✓ Porter votre capteur et votre Smart Transmetteur lorsque vous passez dans des détecteurs de métal dans les aéroports ne présente pas de danger. En vol, le Smart Transmetteur se comporte comme tout autre appareil Bluetooth. Conformez-vous à toutes les directives de sécurité des compagnies aériennes.

- ✓ La barre d'état sur l'application mobile affiche Recueil de données jusqu'à ce que le Smart Transmetteur ait reçu le premier taux de glucose après avoir été placé au-dessus du capteur. Vous pouvez voir cette barre d'état juste après avoir chargé le Smart Transmetteur.

5

Avertissement : si votre Smart Transmetteur est endommagé ou fissuré, NE L'UTILISEZ PAS. Il représente un danger électrique, peut se mettre à mal fonctionner, voire à vous donner des décharges électriques.

Fixer le Smart Transmetteur au-dessus du capteur inséré

Le Smart Transmetteur doit être bien fixé sur la peau directement au-dessus du capteur, à l'aide d'un patch adhésif jetable. L'adhésif est conçu pour être changé chaque jour ; il a un côté collant en acrylique qui se colle au dos du Smart Transmetteur et un côté collant en silicone qui se colle sur la peau. Les surfaces de la peau et du Smart Transmetteur doivent être propres et sèches pour que les surfaces de l'adhésif collent bien. Les premiers jours après l'insertion, vous porterez le Smart Transmetteur au-dessus du bandage Tegaderm. Laissez en place le bandage Tegaderm pendant la durée indiquée par votre professionnel de santé. Jetez les patchs adhésifs conformément aux réglementations locales.

Remarque : vous recevrez des patchs adhésifs de la part de votre médecin ou professionnel de santé. Des patchs adhésifs blancs et transparents sont fournis. Les adhésifs blancs sont perforés afin de laisser échapper l'humidité. Les adhésifs transparents peuvent être utilisés lorsque vous voulez les porter plus discrètement.


Mise en garde : si vous avez des inquiétudes particulières en ce qui concerne les allergies aux silicones, contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce dispositif. Jetez l'adhésif au bout de 24 heures.

1. Retirez la pellicule de papier sur laquelle figure un Smart Transmetteur Eversense E3, au dos de l'adhésif. Essayez de ne pas toucher la partie collante au centre de l'adhésif.




2. Alignez le Smart Transmetteur au-dessus du côté collant (centre) du patch et appuyez fermement pour le fixer.

- Le Smart Transmetteur doit être positionné de sorte que ses côtés soient face aux rebords du patch (comme illustré).

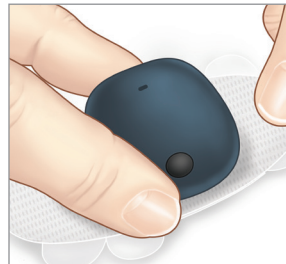

3. Retirez la grande pellicule transparente et positionnez le Smart Transmetteur juste au-dessus du capteur.


- Pour que le signal soit optimal, le Smart Transmetteur doit être placé directement au-dessus du capteur. La force du signal peut aussi être améliorée en faisant tourner le Smart Transmetteur au-dessus du capteur, de manière à centrer le capteur verticalement sous le Smart Transmetteur.

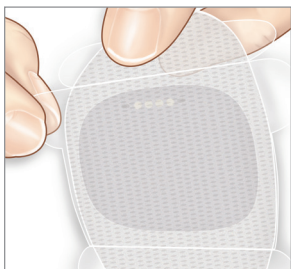

Vous pouvez porter le Smart Transmetteur au-dessus du Tegaderm avec le patch adhésif Eversense une fois la phase d'acclimatation de 24 heures terminée.

4. Vérifiez la connexion entre le Smart Transmetteur et le capteur.

- Touchez **Menu > Guide de placement**.
- Lorsque vous fixez votre Smart Transmetteur, reportez-vous au **Guide de placement** pour assurer une bonne connexion entre le capteur et le Smart Transmetteur.

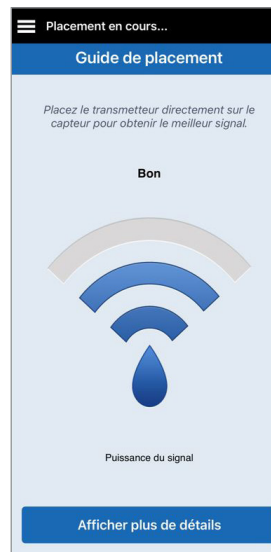


Remarque : pour plus d'informations sur la puissance du signal et la position du transmetteur, voir *Guide de placement – Écran Afficher plus de détails* à la section *Relier le capteur*.

5. Appuyez fermement sur le patch adhésif sur la **surface de la peau** au-dessus du capteur.


N'appuyez PAS trop les premiers jours après l'insertion.

- Le Smart Transmetteur doit être positionné de manière à ce que les rabats de l'adhésif soient horizontaux sur le bras.

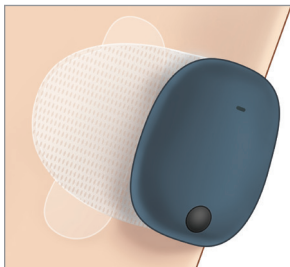

6. Utilisez la languette pour retirer la pellicule transparente restante.

- Lissez l'adhésif sur la peau. Assurez-vous que l'adhésif soit bien plat sur la surface de la peau.

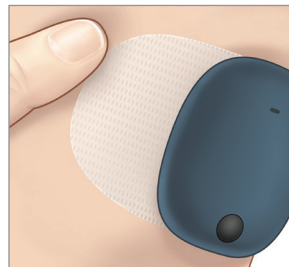

Mettre en marche et arrêter le Smart Transmetteur

Le Smart Transmetteur comporte un bouton de mise en marche permettant de le mettre en marche et de l'arrêter. Le bouton de mise en marche et deux diodes électroluminescentes (DEL) servent aussi à indiquer le niveau de charge de la pile.

1. Pour mettre en marche le Smart Transmetteur, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant cinq secondes environ.

- Le Smart Transmetteur vibre une fois.
- Relâchez le bouton de mise en marche et la DEL clignote une fois pour indiquer que le transmetteur est en marche.

À tout moment, vous pouvez vérifier que le transmetteur est bien en marche en appuyant sur le bouton de mise en marche. Si la DEL apparaît, le Smart Transmetteur est en marche. Si aucune DEL n'apparaît, le Smart Transmetteur est à l'arrêt.



2. Pour arrêter le Smart Transmetteur, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant cinq secondes environ.

- Le Smart Transmetteur vibre une fois.
- Relâchez le bouton de mise en marche et la DEL clignote une fois pour indiquer que le transmetteur est arrêté.

Entretien et maintenance du Smart Transmetteur

- Gardez le Smart Transmetteur propre (exempts de toute saleté visible) et protégé lorsqu'il n'est pas utilisé. Essuyez l'extérieur avec un chiffon entre les utilisations pour le garder propre.
- Contactez le Support clientèle pour obtenir un transmetteur de rechange si vous recevez une alerte d'erreur pile.
- Chargez le Smart Transmetteur lorsque la charge de la pile est faible.
- Utilisez uniquement l'alimentation fournie avec votre système pour charger la pile du Smart Transmetteur. Utiliser une alimentation différente de celle qui est fournie par Senseonics peut annuler la garantie de votre Smart Transmetteur. N'UTILISEZ PAS l'alimentation si elle est endommagée de manière quelconque.
- Pour nettoyer votre Smart Transmetteur, essuyez-le avec un chiffon humide ; jetez le chiffon conformément aux réglementations de mises au rebut qui sont en vigueur dans votre pays.
- Mettez au rebut le Smart Transmetteur et tous les autres composants du système conformément aux réglementations qui sont en vigueur dans votre région.

Indicateur du niveau de charge de la pile

Le niveau de charge de la pile du Smart Transmetteur est indiqué dans l'application et sur le Smart Transmetteur lui-même.

Avec l'application :

- Touchez **Menu > À propos > Mon Transmetteur**. Faites défiler l'écran jusqu'à la ligne Niveau de charge de la pile. Il indique quelle est la charge résiduelle de la pile.

Ou

- Contrôlez l'icône de pile dans l'angle supérieur droit de l'écran **MON GLUCOSE**. Une icône de pile rouge indique que la pile du Smart Transmetteur est à plat.

Avec le Smart Transmetteur :

- Le Smart Transmetteur étant en marche, appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche. La DEL clignote en vert une fois que la pile est chargée à au moins 10 %. Il est recommandé de toujours charger le Smart Transmetteur pendant 15 minutes sur une prise murale afin de garantir une charge complète. Vous trouverez plus de détails sur les DEL à la page suivante.

DEL d'état

Le Smart Transmetteur communique différents états, selon la couleur de la DEL.

• Pendant l'utilisation du Smart Transmetteur :

| État de la DEL | État | Action |
|--|--|---|
| Alternatif vert et orange lorsque l'on appuie sur le bouton de mise en marche 3 fois en 5 secondes | Mode de détection | Faites un jumelage du Smart Transmetteur avec l'appareil mobile |
| Ne clignote pas lorsque l'on appuie sur le bouton de mise en marche | Smart Transmetteur arrêté | Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 5 secondes pour le mettre en marche |
| Clignote en vert (une fois) lorsque l'on appuie sur le bouton de mise en marche | Niveau de charge de la pile 10 % - 90 % | Aucune action requise dans l'immédiat |
| Clignote en orange (une fois) lorsque l'on appuie sur le bouton de mise en marche | Pile déchargée, moins de 10 % de charge résiduelle | Chargez la pile prochainement |
| DEL orange pendant une minute | Une alerte s'est déclenchée | Vérifiez l'application sur votre appareil mobile pour comprendre l'alerte |

• **Pendant le chargement du Smart Transmetteur :**

| État de la DEL | État de la pile | Action |
|--|----------------------------|--|
| Orange fixe ou clignotant lorsque l'appareil est connecté au câble USB | Chargé entre 0 % et 65 % | Chargez pendant 15 minutes avant de débrancher |
| Vert fixe lorsque connecté au câble USB | Chargé entre 65 % et 100 % | Chargez pendant 15 minutes avant de débrancher |

6. Étalonner le système

Cette section décrit la procédure d'étalonnage et l'horaire prévu pour votre système MGC Eversense E3.

Avertissement : N'UTILISEZ PAS de site alternatif lorsque vous entrez des valeurs de glycémie pour l'étalonnage.

6

Pour garantir une performance optimale, un étalonnage de routine est requis. Pour cela on réalise une glycémie par piqûre au doigt avec un lecteur de glycémie. Vous pouvez utiliser n'importe quel lecteur de glycémie commercial pour l'étalonnage. Une fois que votre capteur a été inséré et qu'il est relié à votre Smart Transmetteur, le système commence sa phase d'acclimatation de 24 heures. Aucun étalonnage n'est requis durant cette phase.

L'étalonnage comporte trois phases :



Phase d'initialisation : à l'issue de la phase d'acclimatation de 24 heures, vous devez faire 4 tests d'étalonnage par piqûre au doigt par jour, espacés les uns des autres de 2 à 12 heures.

2 Phase d'étalonnage quotidien : après la phase d'initialisation, vous devez réaliser un test d'étalonnage par piqûre au doigt toutes les 12 heures pendant au moins 21 jours.

1 phase d'étalonnage quotidien : le système détecte si 1 ou 2 étalonnages quotidiens sont nécessaires et vous en informe. Avec 1 phase d'étalonnage quotidien, vous devez réaliser un test d'étalonnage par piqûre au doigt toutes les 24 heures.

Après les 21 premiers jours, le système indique si 1 ou 2 étalonnages quotidiens sont nécessaires.

6

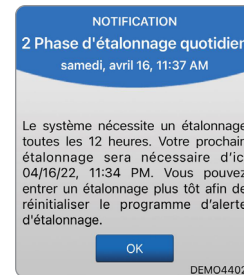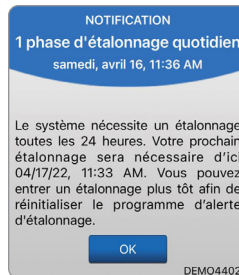

Avertissement : avec 2 Phase d'étalonnage quotidien, le système MGC Eversense E3 nécessite un étalonnage toutes les 12 heures pour fournir des valeurs précises. Avec 1 phase d'étalonnage quotidien, le système MGC Eversense E3 nécessite un étalonnage toutes les 24 heures. Vous ne devez pas utiliser les valeurs MGC pour prendre des décisions de traitement avant d'avoir suivi les instructions pour l'étalonnage quotidien.

L'étalonnage de routine est critique pour assurer la performance optimale du système MGC Eversense E3.

Les conseils suivants pourront vous aider à améliorer vos mesures d'étalonnage :

Conseils pour garantir un bon étalonnage :

- ✓ Étalonnez uniquement lorsque le glucose NE varie PAS trop rapidement (par exemple, avant les repas, avant l'injection d'une dose d'insuline).
- ✓ Étalonnez lorsque vous savez que vous n'allez pas retirer le Smart Transmetteur pendant les 15 minutes suivantes.
- ✓ Lavez-vous les mains à l'eau tiède et au savon et séchez-les bien avant de mesurer votre glycémie. Il est très important d'avoir des mains propres et sèches pour faire votre test de glycémie.
- ✓ Suivez toujours les instructions du fabricant du lecteur de glycémie pour obtenir des valeurs de glycémie exactes pour l'étalonnage.
- ✓ Assurez-vous que le code qui se trouve sur le flacon de test correspond au code de votre lecteur de glycémie (si ces codes existent).

L'étalonnage NE sera PAS terminé ou les résultats NE seront PAS acceptés si :

- ✗ La valeur du lecteur de glycémie est inférieure à 2,2 mmol/l.
- ✗ La valeur du lecteur de glycémie est supérieure à 22,2 mmol/l.
- ✗ La valeur du lecteur de glycémie a été mesurée plus de 10 minutes avant d'avoir saisi la valeur dans l'application Eversense App.
- ✗ La valeur du taux de glucose capteur diffère significativement de la valeur du lecteur de glycémie.
- ✗ Votre Smart Transmetteur a été retiré ou n'a pas pu recueillir de données du taux de glucose capteur pendant les 15 minutes suivant la saisie de votre valeur d'étalonnage.

Phases d'étalonnage

A. Phase d'initialisation (après la phase d'acclimatation de 24 heures)

Durant cette phase, vous devez faire 4 tests de glycémie par piqûre au doigt.

- Les 4 tests d'étalonnage doivent être réalisés à 2 à 12 heures les uns des autres et les 4 tests doivent être réalisés sur une période de 36 heures. Après 8 heures sans entrée d'étalonnage, aucune entrée de glucose n'apparaît.
 - 1^{er} étalonnage = 24 heures après avoir relié le capteur.
 - 2^{ème} étalonnage = 2 à 12 heures après un 1er étalonnage réussi.
 - 3^{ème} étalonnage = 2 à 12 heures après le 2ème étalonnage réussi.
 - 4^{ème} étalonnage = 2 à 12 heures après le 3ème étalonnage réussi.
- Les valeurs du taux de glucose commencent à apparaître dans l'application quelques minutes après le 2ème étalonnage.

IMPORTANT : si votre Smart Transmetteur n'est pas en marche et s'il n'est pas jumelé à l'application Eversense App et avec le capteur, le système ne vous invitera pas à effectuer d'étalonnage.

Retour à la phase d'initialisation

Si l'un des choses suivantes se produisent, le système reviendra en phase d'initialisation.

- Vous n'avez pas fait de test d'étalonnage dans les 12 heures qui ont suivi la phase d'initialisation.
- Vous n'avez pas fait 4 tests d'étalonnage dans les 36 heures qui ont suivi la phase d'initialisation.
- Vous n'avez pas fourni les entrées d'étalonnage requises pendant la phase d'étalonnage quotidien.
 - 1 étalonnage toutes les 12 heures pendant les 21 premiers jours de port, et à tout moment quand le système est réglé sur 2 Phase d'étalonnage quotidien
 - 1 étalonnage toutes les 24 heures lorsque le système est réglé sur 1 phase d'étalonnage quotidien

- Les dernières valeurs du lecteur de glycémie diffèrent significativement des valeurs du taux de glucose capteur.
- Le Smart Transmetteur est déchargé depuis plus de 16 heures.
- Vous recevez une alerte Vérification du capteur.
- Six heures après avoir reçu une alerte Mise hors-service du capteur.

B. Phases d'étalonnage quotidien

Il y a deux phases d'étalonnage quotidien.



Le réglage 2 Phase d'étalonnage quotidien nécessite un test au lecteur de glycémie toutes les 12 heures. La phase d'étalonnage quotidien commence à l'issue de la phase d'initialisation.

- 12 heures après votre dernier étalonnage réussi, le système vous invite à réaliser un étalonnage.
- Vous pouvez entre des étalonnages plus souvent. Les entrées d'étalonnage quotidiennes doivent être espacées d'au moins une heure.
- Si vous ne réalisez aucun étalonnage pendant 16 heures, vous recevez une alerte Étalonnage en retard et aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche jusqu'à ce que vous entriez une valeur d'étalonnage. Après 24 heures sans valeur d'étalonnage, vous recevez une alerte Étalonnage expiré et le système retourne en phase d'initialisation.

Le réglage 1 Phase d'étalonnage quotidien nécessite un test de glycémie par piqûre au doigt toutes les 24 heures.

- 24 heures après votre dernier étalonnage réussi, le système vous invite à réaliser un étalonnage.
- Vous pouvez entre des étalonnages plus souvent. Les entrées d'étalonnage quotidiennes doivent être espacées d'au moins une heure.

- Si vous ne réalisez aucun étalonnage pendant 28 heures, vous recevez une alerte Étalonage en retard et aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche jusqu'à ce que vous entriez une valeur d'étalonnage. Après 40 heures sans valeur d'étalonnage, vous recevez une alerte Étalonage expiré et le système retourne en phase d'initialisation.

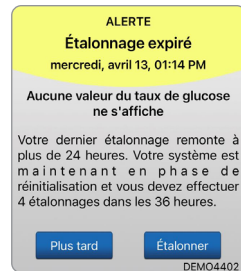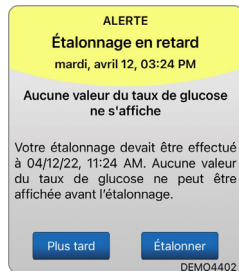

Avvertissement : certaines conditions et alertes empêchent l'affichage des données de taux de glucose. Vous devez alors utiliser votre système de surveillance de la glycémie pour prendre des décisions de traitement. Vous devez lire attentivement la section *Alertes et notifications* de ce *Guide de l'utilisateur* pour comprendre ces conditions.

Remarque : si une entrée d'étalonnage est très différente de la valeur du taux de glucose capteur du système, vous recevrez une notification Étalonner maintenant environ une heure après. Une alerte Étalonner maintenant apparaît 11 à 12 heures plus tard, indépendamment de la phase d'étalonnage quotidien actuelle. Dans cette situation, si vous devez réaliser un étalonnage dans les 16 heures, aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche. Après 24 heures sans étalonnage, le système retourne en phase d'initialisation.





Comment effectuer l'étalonnage

Avertissement : étalonnez toujours le système à partir d'un échantillon sanguin obtenu par piqûre au doigt. **N'UTILISEZ PAS** une gouttelette de sang provenant d'un autre site (comme l'avant-bras ou la paume de la main) pour mesurer la glycémie avec le lecteur et étalonner le système.


Remarque : vous pouvez entrer des valeurs d'étalonnage supplémentaires à condition que l'intervalle entre chaque étalonnage soit d'au moins 1 heure.

6

1. Vous pouvez entrer la valeur d'étalonnage en touchant **Étalonner** dans le menu principal ou depuis la notification ou l'alerte **Étalonner maintenant**.

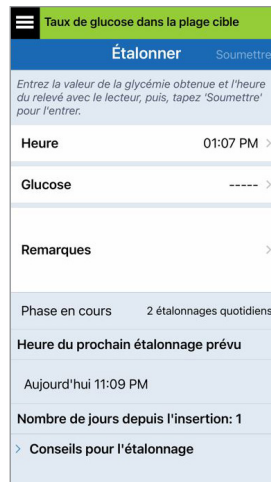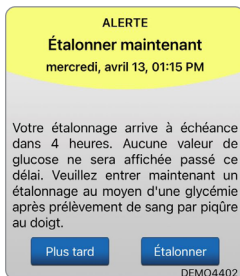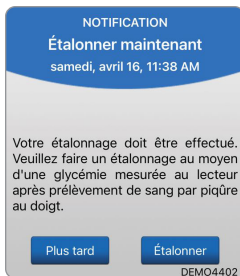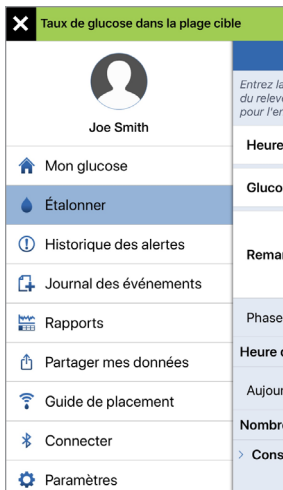

2. Obtenez une valeur du lecteur de glycémie à partir d'une piqûre au doigt.

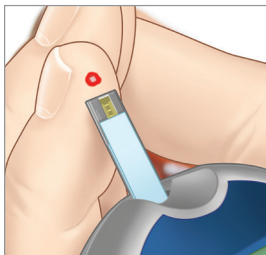

3. Touchez **Glucose** et entrez la valeur de votre test de glycémie par piqûre au doigt.

- Touchez **OK**.
- Touchez **Remarques** pour entrer des remarques.
- Touchez **OK**.

Taux de glucose dans la plage cible

Étalonner Soumettre

Entrez la valeur de la glycémie obtenue et l'heure du relevé avec le lecteur, puis, tapez 'Soumettre' pour l'entrer.

Heure 01:07 PM >

Glucose ----- >

Remarques >

Phase en cours 2 étalonnages quotidiens

Heure du prochain étalonnage prévu

Aujourd'hui 11:09 PM

Nombre de jours depuis l'insertion: 1

> Conseils pour l'étalonnage

Hyperglycémie, glycémie hors plage d'Alerte

Étalonner Soumettre

Entrez la valeur de la glycémie obtenue et l'heure du relevé avec le lecteur, puis, tapez 'Soumettre' pour l'entrer.

Heure 01:14 PM >

Glucose ----- >

Remarques >

Phase en cours 2 étalonnages quotidiens

Heure du prochain étalonnage prévu

Aujourd'hui 11:09 PM

Annuler Glucose OK

6.7

6.8

6.9

7.0

7.1

Remarque : vous ne pouvez pas entrer une valeur d'étalonnage datant de plus de 10 minutes.

4. L'écran **ÉTALONNER** affiche maintenant l'heure et la valeur du taux de glucose que vous avez entrée. Si cette valeur n'est pas correcte, répétez l'étape 3.

- Si elle est correcte, touchez **Soumettre**.

Taux de glucose dans la plage cible

ÉTALONNER Soumettre

Entrez la valeur de la glycémie obtenue et l'heure du relevé avec le lecteur, puis, tapez 'Soumettre' pour l'entrer.

Heure 11:30 AM >

Glucose 9.3 mmol/L >

Remarques >

Phase en cours 2 étalonnages quotidiens

Heure du prochain étalonnage prévu

Maintenant

Nombre de jours depuis l'insertion: 8

> Conseils pour l'étalonnage

5. L'écran **ÉTALONNAGE EN COURS** apparaît.

- Touchez **OK**.

ÉTALONNAGE EN COURS (14 min, 54 sec)

ÉTALONNER Soumettre

Entrez la valeur de la glycémie obtenue et l'heure du relevé avec le lecteur, puis, tapez 'Soumettre' pour l'entrer.

Heure ----- >

Glucose ----- >

Rem: **ÉTALONNAGE EN COURS**
Veuillez ne pas retirer le transmetteur du site du capteur pendant 15 minutes. Si vous retirez le transmetteur, il faut refaire l'étalonnage.

Phase en cours Étalonnage en cours

Heure du prochain étalonnage prévu


Maintenant

Nombre de jours depuis l'insertion: 4

> Conseils pour l'étalonnage

6. L'écran **MON GLUCOSE** apparaît avec une icône grise de goutte de sang pour indiquer que votre étalonnage par piqûre au doigt est en cours.

La goutte de sang devient rouge lorsque la valeur d'étalonnage est acceptée.

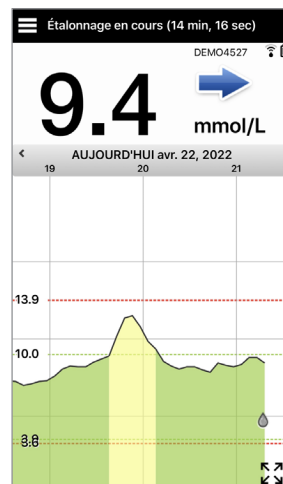

IMPORTANT : le Smart Transmetteur doit rester en place au-dessus du capteur pendant 5 minutes au moins avant le test et pendant les 15 minutes qui suivent le test, pendant que l'étalonnage est en cours. La barre d'état qui se trouve en haut de l'écran vous prévient quand l'étalonnage sera terminé. Si le Smart Transmetteur est retiré avant la fin de l'étalonnage, vous serez invité à réaliser un nouvel étalonnage.

Remarque : parfois, il se peut que votre résultat d'étalonnage NE SOIT PAS accepté.

L'étalonnage N'est PAS accepté si :

- ✘ La valeur du lecteur de glycémie est inférieure à 2,2 mmol/l.
- ✘ La valeur du lecteur de glycémie est supérieure à 22,2 mmol/l.






L'étalonnage ne peut pas être utilisé

Les valeurs de glycémie supérieures à 22,2 mmol/L ne peuvent pas être utilisées pour l'étalonnage. Veuillez prendre une mesure appropriée et réaliser un nouvel étalonnage lorsque la glycémie est comprise entre 2,2 et 22,2 mmol/L. Cette entrée sera consignée comme une entrée de glycémie.

OK

- ✘ Votre Smart Transmetteur a été retiré ou n'a pas pu recueillir de données du taux de glucose capteur pendant les 15 minutes suivant la saisie de votre valeur d'étalonnage.

Les couleurs des icônes d'étalonnage indiquent l'état de votre entrée d'étalonnage. Voir le tableau ci-dessous.

| État | Description |
|--|---|
|  Étalonnage en cours | Affiché pendant -15 minutes après avoir entré une valeur d'étalonnage. Ne retirez pas votre transmetteur pendant cette période. Cette icône devient rouge, noire ou bleue lorsque l'étalonnage n'est plus en cours. |
|  Étalonnage accepté | Affiché après la période d'étalonnage d'environ 15 minutes si l'entrée d'étalonnage est acceptée. |
|  Étalonnage inachevé | Affiché si le transmetteur est retiré d'au-dessus du capteur au cours de la période d'étalonnage d'environ 15 minutes. Une nouvelle entrée d'étalonnage sera nécessaire. |
|  L'étalonnage ne peut pas être utilisé | Affiché si la valeur d'étalonnage entrée est inférieure à 2,2 mmol/l ou supérieure à 22,2 mmol/l. La valeur entrée est enregistrée comme entrée de glycémie manuelle. Réalisez un nouvel étalonnage lorsque votre valeur de glycémie est comprise entre 2,2 et 22,2 mmol/l. |
|  Entrées d'événements de glycémie | Affiché lors de la saisie manuelle d'une valeur de glycémie via le journal des événements. |

7. Utiliser l'application

Cette section décrit l'application Eversense App, son écran principal, son graphe de tendance, ses flèches de tendance et l'écran de menu.

L'application communique avec le Smart Transmetteur pour recevoir puis afficher des données de glucose, des tendances, des graphiques et des alertes. L'application garde aussi en mémoire votre historique des taux de glucose pendant un maximum de 90 jours de relevés.

Remarque : lorsque vous vous déconnectez de l'application Eversense App, votre Smart Transmetteur n'envoie pas de données de glucose à l'application jusqu'à ce que vous vous reconnectiez.

L'écran **MON GLUCOSE** permet d'accéder facilement :

- Aux mesures du taux de glucose du capteur en temps réel.
- Au taux et aux tendances de variation de votre taux de glucose.
- À des graphes d'évolution de votre taux de glucose.
- À des alertes (d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie).
- À des événements comme les repas, les exercices et les médicaments.

Remarque : une connexion Internet sans fil est requise pour télécharger ou mettre à jour l'application Eversense App.

Gestion du compte Eversense

Pour des raisons de sécurité, si vous entrez un mot de passe incorrect trois fois de suite dans l'application mobile, votre compte sera bloqué pendant 30 minutes. Pendant ce temps, vous n'aurez pas accès à vos données MGC sur l'application mobile.

Mot de passe incorrect

Vous avez entré un mot de passe incorrect 1 fois. Il vous reste 2 essais avant que votre compte soit bloqué provisoirement.

OK

Compte bloqué pendant 30 minutes

Vous avez entré un mot de passe incorrect 3 fois. Votre compte est bloqué provisoirement pour des raisons de sécurité. Veuillez réessayer à 10:57 AM.

OK

7

Mise en garde : si vous ne pouvez pas accéder à vos données MGC, vous devez contrôler votre glycémie à l'aide de votre système de surveillance de la glycémie.

L'application mobile Eversense réalisera des contrôles réguliers afin de confirmer que vos identifiants de connexion n'ont pas été modifiés depuis votre compte DMS Eversense.

Si vous modifiez le mot de passe de votre compte Eversense depuis votre écran de connexion au DMS ou depuis la page **Changer le mot de passe** du DMS, vous devez vous déconnecter de l'application mobile Eversense et vous reconnecter avec le nouveau mot de passe. Si les mots de passe ne correspondent pas, l'application mobile Eversense App vous en informe et indique que certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles, par exemple, vous ne pouvez pas synchroniser vos données sur votre compte DMS, vous ne pouvez pas ajouter d'utilisateurs Eversense NOW à votre cercle et vous ne pouvez pas apporter de modifications à votre photo de profil.

ALERTE

Nouveau mot de passe détecté

jeudi, avril 21, 14:24

Un nouveau mot de passe a été détecté pour votre compte DMS. Pour continuer, déconnectez-vous de l'application et reconnectez-vous. Si vous n'avez pas apporté cette modification, contactez le support clientèle.

OK

DEMO4527

Nouveau mot de passe détecté

Un nouveau mot de passe a été détecté pour votre compte DMS. Pour continuer, déconnectez-vous de l'application et reconnectez-vous. Si vous n'avez pas apporté cette modification, contactez le support clientèle.

OK

Si vous entrez un mot de passe incorrect trois fois sur votre page de connexion au DMS, certaines fonctionnalités de l'application mobile peuvent être indisponibles pendant 30 minutes : par exemple aucune synchronisation des données vers votre compte DMS, aucun utilisateur d'Eversense NOW ne peut être ajouté à votre cercle et aucune modification ne peut être apportée à votre photo de profil. Vous ne devez pas vous déconnecter de l'application mobile pendant cette période.

Compte bloqué pendant

30 minutes

Un mot de passe incorrect a été entré 3 fois. Cette fonctionnalité est provisoirement indisponible. Veuillez réessayer dans 30 minutes. Ne vous déconnectez PAS de l'application mobile pendant 30 minutes.

OK

Vérifier les paramètres de votre appareil mobile.


Pour utiliser le système MGC Eversense E3, il vous faut un appareil mobile (comme un smartphone). Il est très important que votre appareil mobile soit configuré correctement pour assurer un affichage exact des valeurs du taux de glucose dans l'application. Suivez les instructions du fabricant de votre appareil mobile pour configurer les éléments suivants :

- La date et l'heure.
- L'activation du Bluetooth.
- L'activation des notifications.
- La charge de la batterie.
- La zone géographique.
- La langue.
- L'audio de l'appareil mobile ne doit pas être sur le vibreur. La fonction Ne pas déranger doit être désactivée.
- Ne pas déranger devrait être désactivé. Ne pas déranger peut être activé automatiquement par certaines applications et certains paramètres, tels que le mode de conduite. Vous trouverez des informations supplémentaires dans les instructions d'utilisation de votre appareil mobile.
- Si votre appareil mobile est réglé en mode « Ne pas déranger », vous n'entendrez pas les notifications provenant de l'application Eversense App.*

*** Avec iOS 12 et versions ultérieures et Android 6 et versions ultérieures, vous pouvez faire en sorte que les alertes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie d'Eversense contournent les paramètres audio de votre téléphone. Voir *Paramètres audio* pour plus d'informations.**

Bien connaître l'écran « Mon Glucose »

L'écran **MON GLUCOSE** est l'écran d'affichage principal pour l'application. Il affiche un grand nombre de données, dont les valeurs du taux de glucose trouvées par le capteur, la flèche indiquant le sens et le taux de variation du taux de glucose, le graphe de tendance, les événements, les étalonnages, les alertes et les notifications.

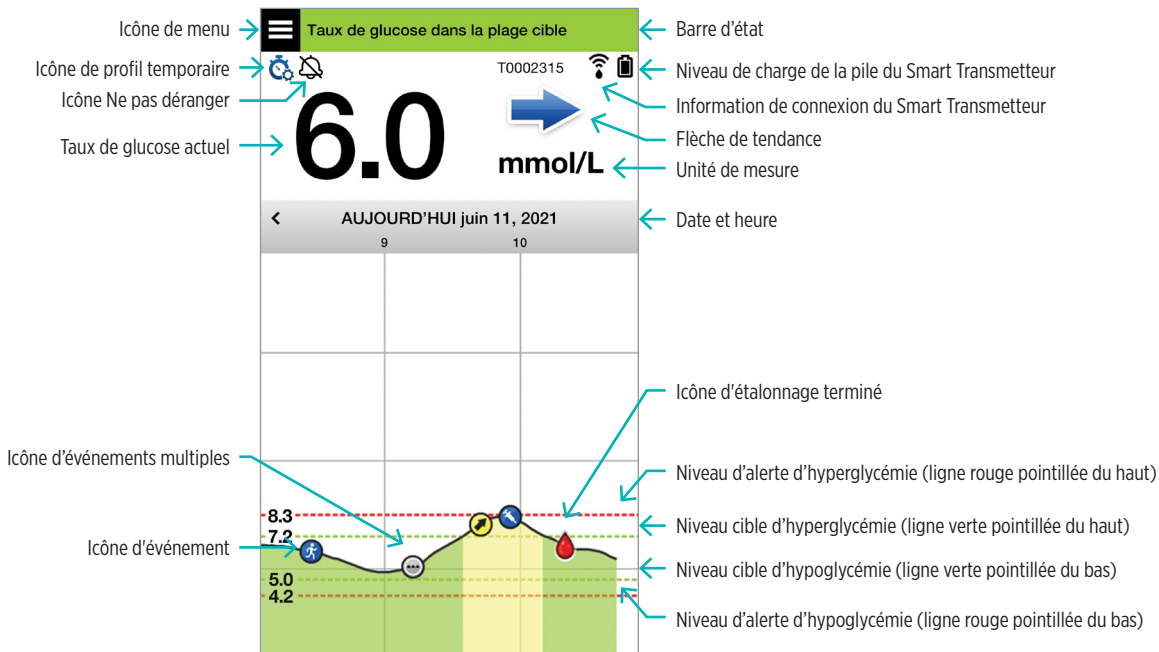

Avant de prendre une décision de traitement, vous devez tenir compte de la valeur de glycémie du capteur, du graphique de tendance, de la flèche de tendance et de toute alerte du système MGC Eversense E3. Si aucune flèche de tendance n'apparaît, le système n'a pas assez de données pour afficher le sens et la vitesse de variation. Vous ne devez pas prendre de décision de traitement reposant uniquement sur la valeur de glycémie du capteur.

Remarque :






- Vous pouvez afficher un aperçu des informations Eversense sur vos appareils iOS ou Android. Pour savoir comment gérer vos widgets, consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile. Le widget Eversense n'est pas disponible sur tous les systèmes d'exploitation.
- Vous pouvez afficher l'écran **MON GLUCOSE** en mode paysage pour accéder à des boutons de raccourci permettant d'afficher les 7, 14, 30 ou 90 derniers jours et toucher un bouton pour envoyer cet affichage par e-mail.

| | |
|--|---|
| Barre d'état | Fournit des données importantes concernant votre taux de glucose actuel et l'état de votre système. |
| ID du Smart Transmetteur | Correspond au Smart Transmetteur que vous utilisez. Vous pouvez modifier le nom en touchant Paramètres > Système . |
| Taux de glucose actuel | Taux de glucose actuel en temps réel. Il est mis à jour toutes les 5 minutes. |
| Date et heure | Date et heure actuelles. Vous pouvez faire défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir d'autres dates et heures. |
| Niveau de charge de la pile du Smart Transmetteur | Indique la charge restante de la pile du Smart Transmetteur. |
| Connexion du Smart Transmetteur | Indique la force de la connexion entre votre Smart Transmetteur et votre capteur ou votre appareil mobile. |
| Flèche de tendance | Indique le sens de variation du taux de glucose. |

| | |
|---|---|
| Unité de mesure | Il s'agit de l'unité de mesure utilisée pour afficher toutes les valeurs du taux de glucose. |
| Niveau d'alerte d'hyperglycémie/hypoglycémie | Niveaux configurés pour les alertes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. |
| Niveau cible d'hyperglycémie/hypoglycémie | Niveaux configurés pour les cibles d'hyperglycémie et d'hypoglycémie (plage cible). |
| Icône d'événements multiples | Indique que plusieurs événements se sont produits simultanément. |
| Icône d'événement | Indique des événements entrés manuellement (ex., exercice). Voir <i>Consignation d'événements</i> pour plus d'informations. |
| Icônes d'étalonnage | Indique le statut des entrées d'étalonnage. |
| Graphes de tendance du glucose | Taux de glucose dans le temps. Vous pouvez faire défiler le graphe en avant et en arrière pour faire apparaître les tendances, zoomer en avant pour afficher les données sur 3 heures au minimum ou zoomer en arrière pour les voir sur un maximum de 3 jours. |
| Menu | Permet une navigation facile vers différentes sections de l'application Eversense App : <ul style="list-style-type: none"> Mon glucose Étalonner Historique des alertes Journal des événements Rapports Partager mes données Guide de placement Connecter Paramètres À propos |

Flèches de tendance

Il existe 5 flèches de tendance distinctes pour montrer le sens de variation actuel de votre taux de glucose, le niveau de votre taux de glucose et sa vitesse de variation.

| | |
|---|--|
|  | Taux de glucose qui s'élève ou chute progressivement à une vitesse comprise entre 0,00 mmol/l et 0,06 mmol/l par minute. |
|  | Niveau du taux de glucose qui s'élève modérément à une vitesse comprise entre 0,06 mmol/l et 0,11 mmol/l par minute. |
|  | Taux de glucose qui chute modérément à une vitesse comprise entre 0,06 mmol/l et 0,11 mmol/l par minute. |
|  | Taux de glucose qui s'élève rapidement à une vitesse de plus de 0,11 mmol/l par minute. |
|  | Taux de glucose qui chute rapidement à une vitesse de plus de 0,11 mmol/l par minute. |

L'application utilise les **20 dernières minutes de données de glucose continues** pour calculer des tendances de glucose.

Lorsqu'il n'y a pas assez des valeurs du capteur disponibles pour calculer une flèche de tendance, elle n'apparaît pas et le taux de glucose est affiché en gris et non en noir.

Avant de prendre une décision de traitement, vous devez tenir compte de la valeur de glycémie du capteur, du graphique de tendance, de la flèche de tendance et de toute alerte du système MGC Eversense E3. Si aucune flèche de tendance n'apparaît, le système n'a pas assez de données pour afficher le sens et la vitesse de variation. Vous ne devez pas prendre de décision de traitement reposant uniquement sur la valeur de glycémie du capteur.

Compréhension des décisions de traitement avec MGC

Veuillez lire le Guide de l'utilisateur du système MGC Eversense E3 et vous familiariser sur les moments où vous devez ou non prendre des décisions de traitement en fonction des informations de votre système MGC. Avant de commencer à utiliser Eversense E3 pour prendre des décisions de traitement, parlez avec un professionnel de santé afin de comprendre l'impact de la nourriture, de l'insuline, des médicaments, du stress et de l'exercice sur votre glycémie.

IMPORTANT :

- Si vos symptômes ne correspondent pas aux données de glucose affichées ou si l'application n'affiche pas à la fois un chiffre et une flèche de tendance, utilisez votre lecteur de glycémie pour prendre des décisions de traitement.
- Utilisez votre lecteur de glycémie pour prendre des décisions de traitement jusqu'à ce que vous compreniez comment Eversense E3 fonctionne pour vous. Vous aurez peut-être besoin de plusieurs jours, semaines ou mois pour vous sentir à l'aide pour prendre des décisions de traitement à l'aide des données de votre système MGC.

Prenez votre temps et suivez les recommandations de votre professionnel de santé concernant les moments où vous pouvez utiliser Eversense E3 plutôt que votre lecteur de glycémie.

Taux de glucose mesuré par le capteur et glycémie

Le capteur mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel, pas dans le sang. Les taux de glucose mesurés par le capteur peuvent donc être inférieurs aux valeurs glycémiques. Par exemple, lorsque votre flèche de tendance MGC présente une chute rapide du taux de glucose, votre glycémie peut être inférieure à la valeur affichée ; ou lorsque votre flèche de tendance MGC présente une augmentation rapide, votre glycémie peut être supérieure à la valeur affichée. Ces situations sont plus probables lorsque votre taux de glucose change rapidement, par exemple après un repas, après un dosage d'insuline ou pendant et après avoir fait de l'exercice. Le stress, la maladie et même certains médicaments que vous pouvez prendre peuvent également avoir un impact sur votre taux de glucose. Parfois, la bonne décision de traitement est d'attendre et de vérifier fréquemment vos données MGC avant d'agir.

Début du port

Au cours de la phase d'acclimatation de 24 heures, les valeurs de glucose ne sont pas affichées. Par ailleurs, au début du port, lorsque votre site d'insertion cicatrise, les valeurs de glucose de votre capteur ne sont pas forcément aussi proches de vos valeurs de glycémie qu'elles le seront une fois la cicatrisation terminée. Utilisez votre lecteur de glycémie pour prendre des décisions de traitement pendant la phase d'acclimatation et jusqu'à ce que vous ayez confiance dans les valeurs de votre système MGC. N'oubliez jamais d'utiliser votre lecteur de glycémie si la manière dont vous vous sentez ne correspond pas à la valeur de glucose ni à la flèche de tendance.

Communication Bluetooth

Le Smart Transmetteur communique sans fil avec votre appareil mobile grâce au Bluetooth pour afficher votre valeur de glucose. En cas d'interruption de la connexion entre votre Smart Transmetteur et votre appareil mobile, vous ne verrez pas de valeur de glucose ni de flèche de tendance. Utilisez votre lecteur de glycémie pour prendre des décisions de traitement si votre Smart Transmetteur ne communique pas avec votre appareil mobile.

Alerte par vibration sur le corps

Votre Smart Transmetteur envoie des alertes vibratoires lorsque vous dépassez les niveaux d'alerte du glucose que vous définissez. Vous ne devez toutefois pas utiliser les alertes par vibrations sur le corps pour prendre des décisions de traitement. Lorsque vous recevez une alerte par vibration sur le corps, contrôlez votre valeur de glucose et la flèche de tendance sur votre application Eversense App.

Surveillance à distance avec Eversense NOW

Les décisions de traitement ne doivent pas être prises en fonction des informations du système MGC affichées sur l'application mobile de surveillance à distance Eversense NOW. La surveillance à distance repose sur les données envoyées de votre appareil mobile au cloud Eversense puis à l'application Eversense NOW. Toute interruption de l'une de ces connexions retardera l'affichage des données dans Eversense NOW. Seules les informations du système MGC envoyées directement du Smart Transmetteur à votre appareil mobile peuvent être utilisées pour prendre des décisions de traitement.

Veillez en parler avec votre professionnel de santé

Repas

Les types repas et d'aliments peuvent avoir différentes incidences sur vos niveaux de glucose et sur les flèches de tendance, de même que des conditions telles qu'un retard de la vidange gastrique. Certains aliments font augmenter votre glycémie plus rapidement que d'autres. Avant d'utiliser les données du système MGC pour prendre des décisions de traitement, parlez avec votre professionnel de santé de la manière de gérer le dosage d'insuline pour différents types d'aliments et de calculer les glucides avec précision.

7

Insuline

L'insuline n'a pas un impact immédiat sur votre glycémie. Par exemple, selon la marque de l'insuline à action rapide utilisée, elle peut commencer à agir après 5 à 15 minutes, avoir un effet maximal au bout de 1 à 2 heures et une durée d'action de 4 à 6 heures. Vous devez bien comprendre quand l'insuline que vous prenez devrait commencer à abaisser votre glycémie, à quel moment elle a le plus d'effet et pendant combien de temps elle continue à abaisser votre glycémie. Votre professionnel de santé vous aidera à comprendre le début, le pic et la durée d'action de votre insuline afin d'éviter des cumuls de doses d'insuline. On parle de cumul de doses d'insuline lorsque vous prenez une dose d'insuline alors qu'une dose précédente continue à abaisser votre glycémie. Cela peut provoquer une hypoglycémie, parfois grave. Plutôt que de réagir en prenant de l'insuline en raison d'une valeur élevée indiquée par le système MGC, demandez-vous si votre dernière dose d'insuline continue à abaisser votre glycémie.

Exercice

Même un exercice relativement léger, si vous n'en avez pas l'habitude, peut faire évoluer votre glycémie plus vite que d'habitude. Si vos symptômes ne correspondent pas à la valeur de votre système MGC, ou si cette valeur et la flèche de tendance ne correspondent pas à ce que vous pensez, utilisez votre lecteur de glycémie pour prendre des décisions de traitement. Certaines personnes présentent une hypoglycémie à retardement plusieurs heures après avoir fait de l'exercice. Vous devez suivre la recommandation de votre professionnel de santé en matière de dosage de l'insuline après avoir fait de l'exercice afin d'éviter une hypoglycémie.

Maladie et stress

La maladie et le stress ont un impact sur votre glycémie. Il peut être utile d'en tenir compte pour prendre des décisions de traitement. N'oubliez pas que le stress n'est pas toujours négatif. Votre glycémie pourrait changer lorsque vous partez en vacances ou que vous vous rendez à une fête. Votre professionnel de santé peut vous aider à créer un programme pour les décisions de traitement lorsque vous êtes malade ou en situation de stress.

Médicaments

Vous devez comprendre l'impact des médicaments sur votre glycémie. Certains médicaments contre le diabète abaissent votre glycémie et certains médicaments, comme les stéroïdes, peuvent augmenter votre glycémie. Avec Eversense E3, des médicaments de la classe des tétracyclines peuvent abaisser faussement les niveaux de glucose et vous ne devez pas vous fier aux valeurs du système MGC lorsque vous prenez ce type de médicaments. Parlez avec votre professionnel de santé des médicaments que vous prenez et de ce que vous devez prendre en considération lorsque vous prenez des décisions de traitement.

Alertes de taux de glucose Eversense E3

Votre professionnel de santé vous aidera à déterminer les niveaux d'alerte de taux de glucose et la plage cible qui vous conviennent. Faites bien attention à vos alertes de taux de glucose Eversense E3. Vous devrez peut-être prendre une décision de traitement. Lorsque vous recevez une alerte de glucose hors plage, la valeur du taux de glucose capteur est inférieure à 2,2 mmol/l et LO apparaît à la place d'un chiffre, ou supérieure à 22,2 mmol/l et HI apparaît à la place d'un chiffre. Demandez à votre professionnel de santé les éventuelles différences entre le traitement habituel et le traitement d'un taux de glucose très bas ou très élevé et utilisez toujours votre lecteur de glycémie pour prendre une décision de traitement lorsque LO ou HI apparaît.




Anticiper

Tenez bien compte de l'heure de la journée pour vos décisions de traitement MGC, tout comme quand vous utilisez votre lecteur de glycémie. Par exemple, si votre glycémie est élevée et augmente juste avant de vous coucher, ajustez votre dose d'insuline conformément à la recommandation de votre professionnel de santé. Réfléchissez également à votre traitement si vous prévoyez de faire de l'exercice ou si vous allez participer à une réunion et rester assis toute la journée. Votre professionnel de santé pourrait recommander d'ajuster votre décision de traitement en fonction de ce qui va se produire afin d'éviter une hypoglycémie ou une hyperglycémie.

Prendre des décisions de traitement avec Eversense E3


Pour prendre une décision de traitement, vous devez tenir compte de :

- Informations de la barre d'état.
- Valeur de glucose actuelle du capteur – la valeur de glucose actuelle devrait apparaître en noir.
- Flèche de tendance – une flèche de tendance devrait apparaître.
- Informations de tendance et alertes récentes.

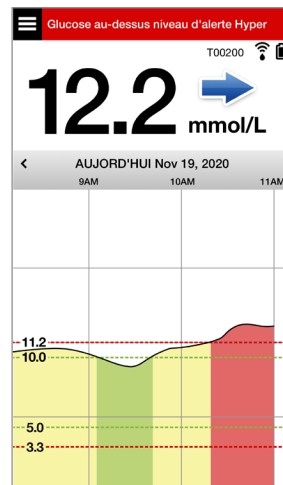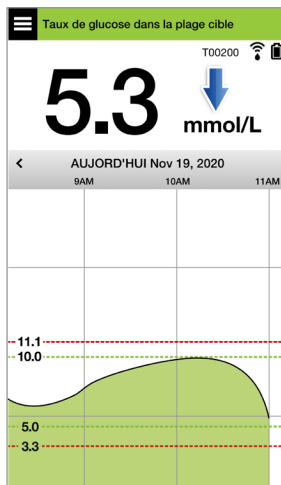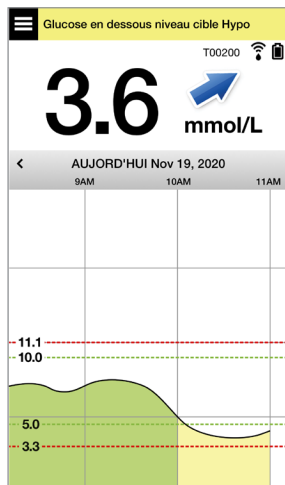

Quand ne PAS prendre de décision de traitement :

- Aucun taux de glucose n'apparaît.
- Aucune flèche de tendance n'apparaît.
- Vos symptômes ne correspondent pas aux données de glucose affichées.
- La valeur actuelle de glucose du capteur apparaît en gris.
- La barre d'état apparaît en orange.
- Vous prenez des médicaments de la classe des tétracyclines.

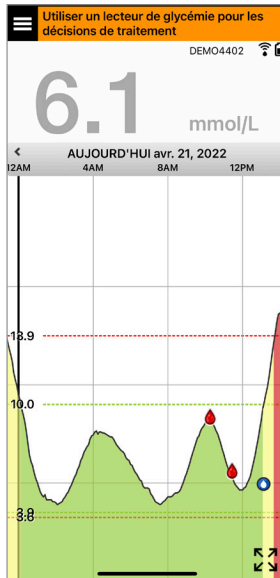





Remarque : consultez toujours les données de glucose de votre application MGC Eversense sur votre smartphone pour prendre des décisions de traitement. N'utilisez pas d'écran secondaire, tel qu'une Apple Watch ou Eversense NOW.


Flèches de tendance Eversense E3 et décisions de traitement

Les flèches de tendance Eversense E3 indiquent le sens et la vitesse de variation de votre glucose afin de vous aider à prévoir son niveau à venir. Parlez avec votre professionnel de santé de l'utilisation des flèches de tendance pour vous aider à prendre des décisions de traitement. Généralement, si la flèche va vers le bas, vous pouvez envisager de prendre moins d'insuline, et si la flèche de tendance va vers le haut, vous pouvez en prendre plus. Veillez à ne pas prendre trop d'insuline en peu de temps, car cela pourrait entraîner une hypoglycémie en raison de cumuls de doses d'insuline. Les flèches Eversense E3 sont indiquées ci-dessous, ainsi que la manière dont vous pouvez les utiliser pour prendre des décisions de traitement. Parlez avec votre professionnel de santé de la manière de réaliser des ajustements du traitement en fonction des flèches de tendance. **Ne prenez jamais une décision de traitement en utilisant le système MGC si aucune flèche n'est affichée.**

| Flèche de tendance Eversense E3 | Ce qu'elle indique | Hypoglycémie | Hyperglycémie | Glycémie sur la plage |
|---------------------------------|---|---|---------------|-----------------------|
| Pas de flèche de tendance | Données insuffisantes pour calculer le sens de la tendance des taux de glucose et la vitesse de changement. | Réalisez une mesure de glycémie par piqûre au bout du doigt avec votre lecteur de glycémie avant de prendre une décision de traitement, même si votre glycémie est sur la plage. | | |

| Flèche de tendance Eversense E3 | Ce qu'elle indique | Hypoglycémie | Hyperglycémie | Glycémie sur la plage | |
|---|---|--|--|--|--|
|  | La glycémie chute rapidement (> 0,11 mmol/l/minute). | Votre glycémie pourrait chuter de 1,7 mmol/l ou plus en 15 minutes. | Traitez-la avec des glucides et demandez-vous si vous fait de l'exercice récemment ou si vous avez pu prendre trop d'insuline. | Si vous avez récemment pris de l'insuline ou si vous êtes sur le point de faire de l'exercice, attendez et vérifiez fréquemment votre valeur MGC et la flèche de tendance avant de prendre une décision de traitement. | Traitez-la avec des glucides et demandez-vous si vous fait de l'exercice récemment ou si vous avez pu prendre trop d'insuline. |
|  | La glycémie chute à une vitesse modérée (entre 0,06 et 0,11 mmol/l/minute). | Votre glycémie pourrait chuter entre 0,8 et 1,7 mmol/l en 15 minutes. | | | |

| Flèche de tendance Eversense E3 | Ce qu'elle indique | Hypoglycémie | Hyperglycémie | Glycémie sur la plage | |
|---|---|--|---|---|---|
|  | <p>La glycémie augmente rapidement (> 0,11 mmol/l/minute).</p> | <p>Votre glycémie pourrait augmenter de 1,7 mmol/l ou plus en 15 minutes.</p> | <p>Si vous avez récemment pris de l'insuline ou si vous êtes sur le point de faire de l'exercice, attendez et vérifiez fréquemment votre valeur MGC et la flèche de tendance avant de prendre une décision de traitement.</p> | <p>Si vous avez récemment pris de l'insuline ou si vous êtes sur le point de faire de l'exercice, attendez et vérifiez fréquemment votre valeur MGC et la flèche de tendance.</p> | <p>Si vous avez récemment pris de l'insuline ou si vous êtes sur le point de faire de l'exercice, attendez et vérifiez fréquemment votre valeur MGC et la flèche de tendance avant de prendre une décision de traitement.</p> |
|  | <p>La glycémie augmente à une vitesse modérée (entre 0,06 et 0,11 mmol/l/minute).</p> | <p>Votre glycémie pourrait augmenter entre 0,8 et 1,7 mmol/l en 15 minutes.</p> | <p>Si vous n'avez pas pris d'insuline récemment et n'êtes pas sur le point de faire de l'exercice, envisagez d'augmenter la dose de correction d'insuline.</p> | <p>Si vous n'avez pas pris d'insuline récemment et n'êtes pas sur le point de faire de l'exercice, envisagez d'augmenter la dose de correction d'insuline.</p> | <p>Si vous n'avez pas pris d'insuline récemment ou terminé de faire de l'exercice, envisagez d'augmenter la dose de correction d'insuline.</p> |

| Flèche de tendance Eversense E3 | Ce qu'elle indique | Hypoglycémie | Hyperglycémie | Glycémie sur la plage |
|--|---|---|--|---|
|  <p>La glycémie change progressivement (0,06 mmol/l/minute ou moins).</p> | <p>Votre glycémie pourrait augmenter ou chuter de jusqu'à 0,8 mmol/l en 15 minutes.</p> | <p>Envisagez de traiter cette situation avec des glucides. Si vous avez récemment pris de l'insuline, vérifiez fréquemment votre valeur MGC et la flèche de tendance.</p> | <p>Si vous avez récemment pris de l'insuline ou si vous êtes sur le point de faire de l'exercice, attendez et vérifiez fréquemment votre valeur MGC et la flèche de tendance.</p> <p>Si vous n'avez pas pris d'insuline récemment, envisagez d'augmenter la dose de correction d'insuline.</p> | <p>Pas de traitement, mais si vous avez récemment pris de l'insuline ou si vous êtes sur le point de faire de l'exercice, vérifiez fréquemment votre valeur MGC et la flèche de tendance.</p> |


Que feriez-vous

Cette section présente des exemples de situations que vous pourriez rencontrer. Il est important de tenir compte de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer avant de prendre des décisions de traitement avec le système MGC. Étudiez bien ces exemples et réfléchissez à ce que vous prendriez en considération avant de prendre une décision de traitement. Si vous n'êtes pas sûr(e), contrôlez toujours votre glycémie par une piqûre au bout du doigt avant de prendre une décision de traitement.

Glycémie inférieure à la cible à 3,6, mais en augmentation modérée. Votre glycémie pourrait atteindre 6,7 en 30 minutes.


Il est 7h00 et vous allez prendre votre petit-déjeuner. Vous avez bu un verre de jus d'orange en vous levant.

- Devriez-vous envisager de prendre un peu moins d'insuline que vous le feriez d'habitude pour votre repas ?
- Devriez-vous prendre la quantité d'insuline habituelle pour ce petit-déjeuner et surveiller votre taux de glucose, la flèche et vos sensations ?

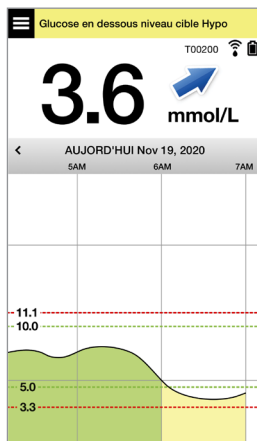

Il est 9h00 et vous avez pris une dose d'insuline pour votre petit-déjeuner il y a 2 heures environ.

- Devriez-vous attendre et surveiller votre taux de glucose et la flèche avant de prendre une décision de traitement ?
- Devriez-vous envisager de prendre des glucides maintenant pour traiter l'hypoglycémie ?

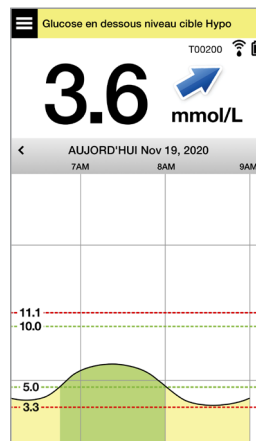

Glycémie dans la cible à 5,0, mais en augmentation rapide. Votre glycémie pourrait atteindre 10,0 ou plus en 45 minutes.


Il est midi et vous allez déjeuner.

- Quelle peut être la cause de l'augmentation de la glycémie ?
- Devriez-vous envisager de prendre plus d'insuline que vous le feriez d'habitude pour votre repas ?
- Que recommande votre professionnel de santé pour ajuster votre insuline dans cette situation ?



Il est 14h00 et vous avez pris une dose d'insuline pour compenser votre repas, et un peu plus en raison de la flèche d'augmentation rapide il y a 90 minutes environ.


- Comme cela ne fait que 90 minutes que vous avez pris de l'insuline, devriez-vous attendre et surveiller votre taux de glucose et les flèches de tendance ?
- Combien de temps votre professionnel de santé recommande-t-il d'attendre entre les doses d'insuline pour éviter un cumul de doses d'insuline ?

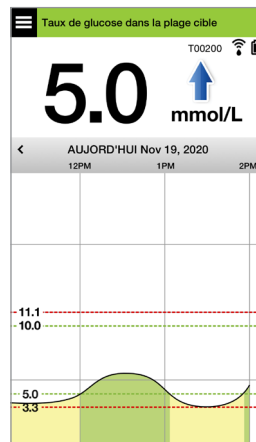

Glycémie dans la cible à 5,3, mais en diminution rapide. Votre glycémie pourrait atteindre 3,6 ou moins en 15 minutes.


Vous allez commencer à faire de l'exercice.

- Quelle peut être la cause de cette chute rapide de la glycémie ?
- Envisagez de prendre un en-cas pour éviter une hypoglycémie.
- Envisagez d'attendre que votre tendance et votre taux de glucose soient plus stables avant de faire de l'exercice. Surveillez bien votre taux de glucose, la flèche de tendance et vos sensations.

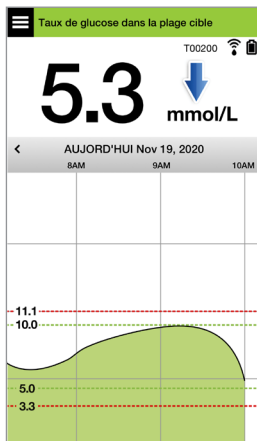

Vous venez de faire de l'exercice.

- Que recommande votre professionnel de santé pour éviter une hypoglycémie après avoir fait de l'exercice ?
- Envisagez de prendre un en-cas pour éviter une hypoglycémie.
- Surveillez bien votre taux de glucose, la flèche de tendance et vos sensations.

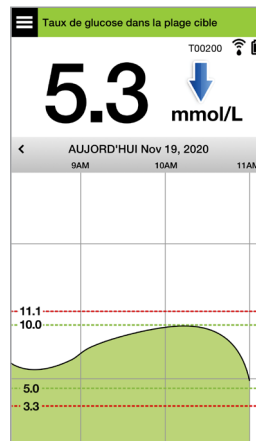


Glycémie supérieure au niveau d'alerte d'hyperglycémie à 12,2, avec une variation progressive. Votre glycémie pourrait chuter à 10,5 ou atteindre 13,9 en 30 minutes.

Il est 19h00 et vous allez dîner.


Cela fait 6 heures que vous avez pris de l'insuline pour le déjeuner.

- Quelle peut être la cause de cette hyperglycémie aussi longtemps après votre dernier repas ?
- La journée a-t-elle été stressante ? Comment vous sentez-vous ?
- Devriez-vous envisager de prendre plus d'insuline ou de manger moins de glucides que vous le feriez d'habitude pour ce repas ?

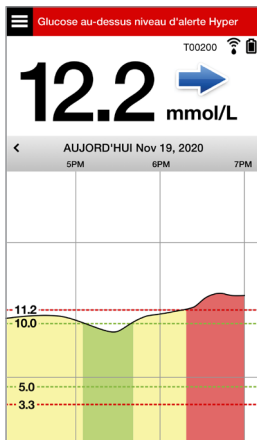

Il est 22h00 et vous allez vous coucher. Cela fait 2h30 que vous avez pris votre dernière dose d'insuline.

- Quelle peut être la cause de cette hyperglycémie ?
- Combien de temps faut-il pour que l'insuline que vous prenez cesse d'abaisser votre glycémie ?
- Quel est le taux de glucose recommandé par votre professionnel de santé au moment d'aller se coucher ?
- Comment traitez-vous généralement une hyperglycémie au moment d'aller vous coucher ?

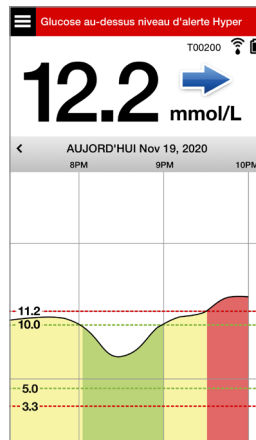


N'oubliez pas, en cas de doute, réalisez toujours une mesure de glycémie par piqûre au bout du doigt avec votre lecteur de glycémie avant de prendre une décision de traitement.

Graphe de tendance

On utilise le graphe de tendance pour visualiser et analyser les données de l'historique et les tendances de variation de vos taux de glucose dans le temps. Il affiche aussi des repères pour les événements que vous avez entrés manuellement dans l'application (ex., tests d'étalonnage et exercice).

Vous pouvez utiliser le graphe de tendance de plusieurs façons :

- Évaluez rapidement où vous vous trouvez par rapport aux cibles de glucose et aux niveaux d'alertes que vous avez fixés. Les lignes pointillées rouges indiquent vos niveaux d'alerte d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, et les lignes pointillées vertes indiquent nos niveaux cibles d'hyperglycémie et d'hypoglycémie (votre plage cible).
- Les zones ombrées qui apparaissent sur le graphe ont des codes de couleur et dépendent des paramètres que vous avez entrés pour le taux de glucose :
 - Les taux de glucose **en dehors des niveaux d'alerte du taux de glucose** seront en rouge.
 - Les taux de glucose **sur la plage de taux de glucose** seront en vert.
 - Les taux de glucose **entre la plage cible et les niveaux d'alerte** seront en jaune.
- Appuyez sur un point du graphe pour afficher la valeur du taux de glucose à ce point.
- Touchez l'un des repères de l'écran de l'application pour afficher plus de détails sur un événement ou une alerte donné.

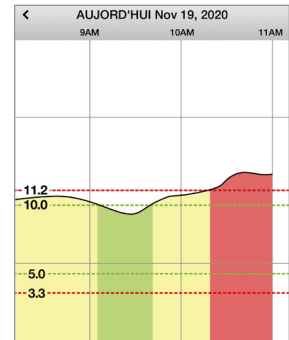











- Resserrez ou étendez l'affichage de l'écran pour afficher différentes plages de dates et d'heures du graphe de tendance. Vous pouvez zoomer en avant ou en arrière pour que le graphe vous donne les données sur une plage aussi réduite que 3 heures et aussi grande que 3 jours.
- Pour afficher les données du graphe de tendance pour une date différente, tapez sur la date qui apparaît à l'écran pour la modifier.
- Vous pouvez afficher le graphe de tendance en mode portrait ou en mode paysage. En mode paysage, des boutons de raccourci permettent de voir les vues à 7, 14, 30 et 90 jours.

Remarque : toutes vos données du taux de glucose resteront en mémoire dans l'application tant que vous avez assez de mémoire sur votre appareil mobile.

Options de menu

L'icône de menu (☰) apparaît dans le coin en haut à gauche de tous les écrans de l'application. Elle permet de passer aux différentes fonctions de l'application. Les options de menu suivantes sont disponibles :

| Options de menu | Description |
|---|---|
|  Mon glucose | Écran principal de l'application affichant la valeur MGC actuelle, le sens et le taux de variation, le graphe de tendance, les événements et les alertes. |
|  Étalonner | Entrez des valeurs d'étalonnage au moyen d'une mesure de glycémie par piqûre au bout du doigt. |
|  Historique des alertes | Permet de passer en revue les alertes et notifications passées. Voir <i>Descriptions des alertes</i> pour plus d'informations. |

| Options de menu | Description |
|---|---|
|  Journal des événements | Sert à entrer les informations concernant les activités, comme les taux de glucose, les repas, l'injection d'insuline, l'état de santé et l'activité physique. Voir <i>Journal des événements</i> pour plus d'informations. |
|  Rapports | Sert à passer en revue différents rapports sur vos données MGC. Voir <i>Rapports</i> pour plus de détails. |
|  Partager mes données | Autoriser les autres personnes à consulter vos données de glucose avec l'application mobile Eversense NOW. |
|  Guide de placement | Vérifiez la communication entre le Smart Transmetteur et le capteur. Utilisez cet écran lorsque vous fixez le Smart Transmetteur pour vous assurer que la communication soit correctement établie. |
|  Connecter | Établissez ou vérifiez la connexion entre le Smart Transmetteur et l'appareil mobile. Une connexion Bluetooth est requise pour envoyer les données à l'application. |
|  Paramètres | Sert à personnaliser les paramètres comme les niveaux cibles, les niveaux d'alerte du taux de glucose, les tonalités et le profil temporaire. Voir <i>Personnaliser vos paramètres</i> pour plus d'informations. |
|  À propos | Sert à afficher des informations sur votre système MGC, y compris les ID du Smart Transmetteur et du capteur. Vous pouvez modifier ou supprimer votre image de profil et vous déconnecter de l'application. |

8. Personnaliser vos paramètres

Cette section décrit comment personnaliser les paramètres de votre système MGC Eversense E3.

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'application pour les éléments suivants :

- **Glucose** : niveaux de glucose et taux de variation qui déclencheront une alerte.
- **Rappels d'étalonnage** : heures de rappels d'étalonnage définies en option.
- **Système** : identifie ou permet de saisir des informations personnalisées sur le système.
- **Paramètres audio** : permet de modifier les sons pour certaines alertes de glucose, de définir les heures des rappels et Ne pas déranger.
- **Profil temporaire** : permet de définir un profil de glucose temporaire.

Niveaux du taux de glucose

Le système MGC Eversense E3 est conçu pour fournir des alertes sur votre Smart Transmetteur et sur votre appareil mobile lorsque votre niveau du taux de glucose a atteint les niveaux d'alerte que vous avez définis vous-même.

Vous décidez des paramètres pour vos alertes relatives au glucose, vos niveaux cibles et vos taux de variation, en vous basant sur les chiffres que votre professionnel de santé vous a donnés.

Avertissement : les alertes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie sont conçues pour vous aider à prendre en charge votre diabète et ne doivent pas être utilisées exclusivement pour détecter une hyperglycémie ou une hypoglycémie. Les alertes doivent toujours s'utiliser en conjonction avec d'autres indications de la glycémie, comme votre taux de glucose, la tendance, le graphe linéaire, etc.

IMPORTANT :

- **Les alertes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie sont différentes de vos cibles d'hyperglycémie et d'hypoglycémie.**
 - Les alertes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie vous préviennent sur votre appareil mobile et sur votre Smart Transmetteur quand vous avez atteint un certain seuil vers le bas ou vers le haut.
 - Les cibles de glucose s'utilisent dans les rapports et sur les graphes linéaires pour indiquer où se situe votre taux de glucose par rapport à des niveaux cibles que vous avez définis. Vous ne recevez pas d'alerte si votre taux de glucose atteint les niveaux cibles.
 - Les alertes prédictives d'hyperglycémie et d'hypoglycémie vous signalent sur votre appareil mobile et sur votre Smart Transmetteur quand votre glycémie est susceptible d'atteindre les niveaux d'alerte d'hyperglycémie et d'hypoglycémie que vous avez définies.

Sur l'écran **Paramètres de taux de glucose**, touchez les symboles ▼ pour développer ou réduire les options de réglages.



Niveaux d'alerte du taux de glucose

Votre système MGC Eversense E3 vous alerte lorsque le niveau de votre taux de glucose sort de la plage d'alerte que vous avez définie. Lorsque vous dépassez vos niveaux d'alerte hyper ou hypo, le Smart Transmetteur se met à vibrer et l'application mobile fait retentir une tonalité sonore et affiche un message sur l'écran.


8

| | |
|-----------------------------------|--|
| Paramètre par défaut | Faible : 3,6 mmol/l Élevé : 13,8 mmol/l Vous pouvez modifier ces niveaux d'alerte en fonction de ce que vous et votre médecin ou professionnel de santé jugez être les bons niveaux pour vous. Votre alerte d'hypoglycémie ne peut pas être supérieure à votre cible d'hypoglycémie et votre alerte d'hyperglycémie ne peut pas être inférieure à votre cible d'hyperglycémie. |
| Plage de paramétrage | Faible : 3,3 à 6,4 mmol/l Élevé : 6,9 à 19,4 mmol/l |
| Paramètre Activé/Désactivé | Le paramètre Alerte d'hypoglycémie est toujours activé Le paramètre Alerte d'hyperglycémie peut être activé et désactivé. Aucune alerte d'hyperglycémie n'apparaît ou ne fait vibrer le Smart Transmetteur si cette fonctionnalité est désactivée. |
| Remarques | Notifications sonores et alertes visuelles sur votre appareil mobile ; alertes vibratoires sur votre Smart Transmetteur. |

IMPORTANT :



- Les niveaux d'alerte du taux de glucose Faible et Élevé que vous définissez sont également utilisés pour les Alertes prédictives. Voir la section *Régler les alertes prédictives*.
- Avec iOS 12 et versions ultérieures et Android 6 et versions ultérieures, vous pouvez faire en sorte que les alertes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie, glycémie hors plage d'Eversense contournent les paramètres audio de votre téléphone. Voir *Paramètres audio* pour plus d'informations.

1. Touchez **Menu > Paramètres > Glucose** pour afficher l'écran **PARAMÈTRES DE TAUX DE GLUCOSE**.

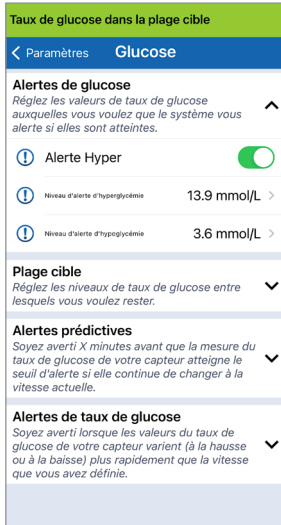

2. Sous **Niveaux d'alerte du taux de glucose**, touchez **Alerte Hyper** et sélectionnez le niveau d'alerte d'hyperglycémie approprié.

- Touchez **OK** lorsque vous avez fini.
- Répétez cette opération pour la sélection **Alerte Hypo**.

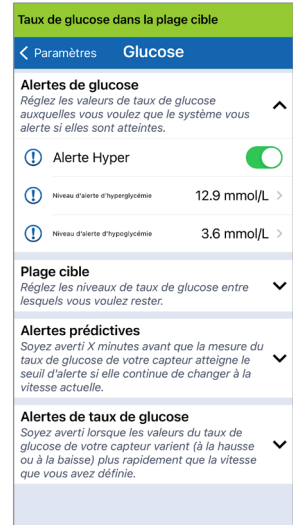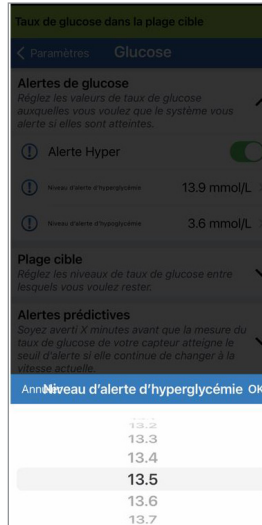

Définir les niveaux cibles du taux de glucose

Les niveaux cibles du taux de glucose sont les niveaux bas et haut qui fixent les limites de la plage dans laquelle vous essayez de rester tout au long de la journée. Ces paramètres sont utilisés dans l'application pour indiquer quand les valeurs du taux de glucose sont dans votre plage cible.

8

| | |
|-----------------------------------|--|
| Paramètre par défaut | Faible : 3,9 mmol/l Élevé : 10,0 mmol/l Vous pouvez modifier cette plage cible en fonction de ce que vous et votre médecin ou professionnel de santé jugez être les bons niveaux cibles pour vous. |
| Plage de paramétrage | Faible : 3,6 à 6,7 mmol/l Élevé : 6,7 à 19,3 mmol/l |
| Paramètre Activé/Désactivé | Toujours activé (ne peut pas être désactivé) |
| Remarques | Utilisé dans les graphes et les tableaux de l'application pour indiquer le temps passé dans la plage cible. |

1. Touchez **Menu > Paramètres > Glucose** pour afficher l'écran **PARAMÈTRES DE TAUX DE GLUCOSE**.

Taux de glucose dans la plage cible

< Paramètres **Glucose**

Alertes de glucose
Réglez les valeurs de taux de glucose auxquelles vous voulez que le système vous alerte si elles sont atteintes. ▼

Plage cible
Réglez les niveaux de taux de glucose entre lesquels vous voulez rester. ▲

Cible Hyper 10.0 mmol/L >

Cible Hypo 3.9 mmol/L >

Alertes prédictives
Soyez averti X minutes avant que la mesure du taux de glucose de votre capteur atteigne le seuil d'alerte si elle continue de changer à la vitesse actuelle. ▼

Alertes de taux de glucose
Soyez averti lorsque les valeurs du taux de glucose de votre capteur varient (à la hausse ou à la baisse) plus rapidement que la vitesse que vous avez définie. ▼

2. Sous **Niveaux de taux de glucose cibles**, touchez **Cible Hyper** et sélectionnez le niveau de cible d'hyperglycémie approprié.

- Touchez **OK** lorsque vous avez fini.
- Répétez cette opération pour la sélection **Cible Hypo**.

Utiliser un niveau de glycémie pour les décisions de traitement

< Paramètres **Glucose**

Alertes de glucose
Réglez les valeurs de taux de glucose auxquelles vous voulez que le système vous alerte si elles sont atteintes. ▼

Plage cible
Réglez les niveaux de taux de glucose entre lesquels vous voulez rester. ▲

Cible Hyper 10.0 mmol/L >

Cible Hypo 3.9 mmol/L >

Alertes prédictives
Soyez averti X minutes avant que la mesure du taux de glucose de votre capteur atteigne le seuil d'alerte si elle continue de changer à la vitesse actuelle. ▼

Alertes de taux de glucose

Annuler **Cible Hyper** OK

10.7

10.8

10.9

11.0

11.1

11.2

Taux de glucose dans la plage cible

< Paramètres **Glucose**

Alertes de glucose
Réglez les valeurs de taux de glucose auxquelles vous voulez que le système vous alerte si elles sont atteintes. ▼

Plage cible
Réglez les niveaux de taux de glucose entre lesquels vous voulez rester. ▲

Cible Hyper 10.5 mmol/L >

Cible Hypo 3.9 mmol/L >

Alertes prédictives
Soyez averti X minutes avant que la mesure du taux de glucose de votre capteur atteigne le seuil d'alerte si elle continue de changer à la vitesse actuelle. ▼

Alertes de taux de glucose
Soyez averti lorsque les valeurs du taux de glucose de votre capteur varient (à la hausse ou à la baisse) plus rapidement que la vitesse que vous avez définie. ▼

Régler les alertes prédictives


Les alertes prédictives vous permettent de savoir à l'avance que vous risquez de vous trouver en hyperglycémie ou en hypoglycémie si la tendance en cours se poursuit.

Les alertes prédictives utilisent les niveaux d'alerte d'hyperglycémie et d'hypoglycémie que vous avez définis pour savoir à l'avance que vous risquez de vous trouver en hyperglycémie ou en hypoglycémie. Vous définissez combien de temps à l'avance vous recevez une alerte avant d'atteindre les niveaux d'alerte (10, 20 ou 30 minutes) si la tendance en cours se poursuit. Lorsque vous atteignez le délai d'alerte anticipée, le Smart Transmetteur se met à vibrer et l'application mobile fait retentir une tonalité sonore et affiche un message sur l'écran.

8



| | |
|-----------------------------------|--|
| Paramètre par défaut | DÉSACTIVÉ |
| Plage de paramétrage | 10, 20 ou 30 minutes à l'avance |
| Paramètre Activé/Désactivé | Vous pouvez activer et désactiver ces alertes. Aucune alerte prédictive ne se produit tant que cette fonction n'est pas activée. La valeur par défaut est de 20 minutes. |
| Remarques | Notifications sonores et alertes visuelles sur votre appareil mobile ; alertes vibratoires sur votre Smart Transmetteur. |

1. Pour activer cette fonction, touchez **Menu > Paramètres > Glucose** pour afficher l'écran **PARAMÈTRES DE TAUX DE GLUCOSE**.

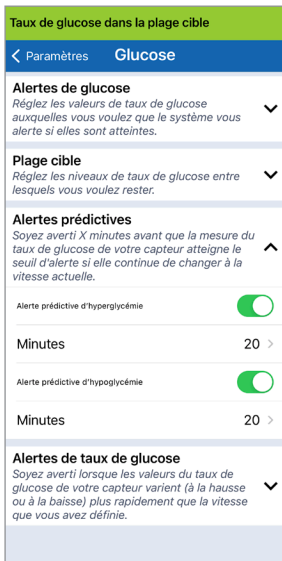

2. En regard des **Alertes prédictives d'hyperglycémie et d'hypoglycémie**, faites glisser le bouton de la position **désactivée** à la position **activée**.

3. Touchez **Minutes** pour sélectionner la durée.
 - Touchez **OK** lorsque vous avez fini.

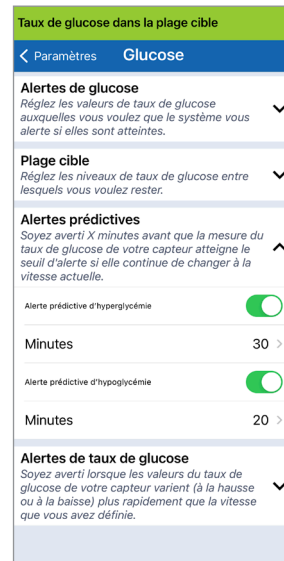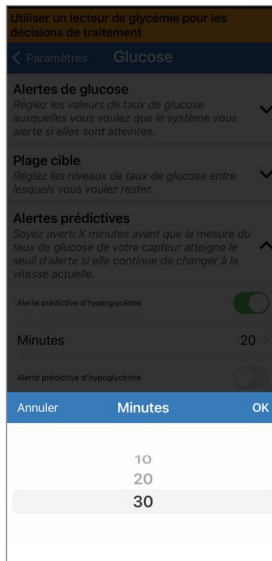


Régler les alertes de taux de variation

Les alertes du taux de variation vous permettent de savoir que votre taux de glucose chute ou s'élève plus rapidement que le niveau d'alerte du taux de variation que vous avez défini.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Paramètre par défaut | DÉSACTIVÉ |
| Plage de paramétrage | 0,08 à 0,28 mmol/l par minute |
| Paramètre Activé/Désactivé | Vous pouvez activer et désactiver ces alertes. Aucune alerte du taux de variation ne se produit tant que cette fonction n'est pas activée. |
| Remarques | Notifications sonores et alertes visuelles sur votre appareil mobile ; alertes vibratoires sur votre transmetteur. |

8



1. Pour activer cette fonction, touchez **Menu > Paramètres > Glucose** pour afficher l'écran **PARAMÈTRES DE TAUX DE GLUCOSE**.

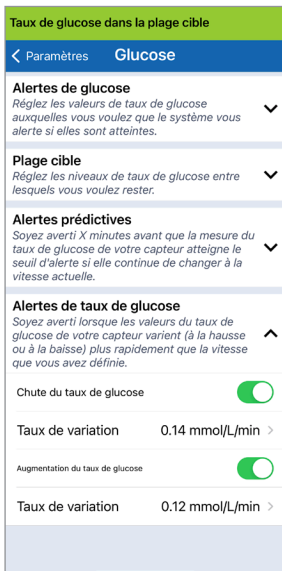

2. En regard des **Alertes de taux de glucose**, faites glisser le bouton de la position **désactivée** à la position **activée**.

3. Touchez **Taux de variation** pour sélectionner le taux.

- Touchez **OK** lorsque vous avez fini.

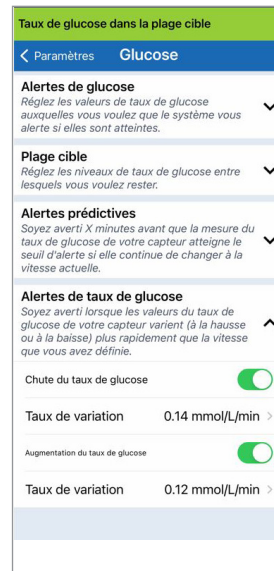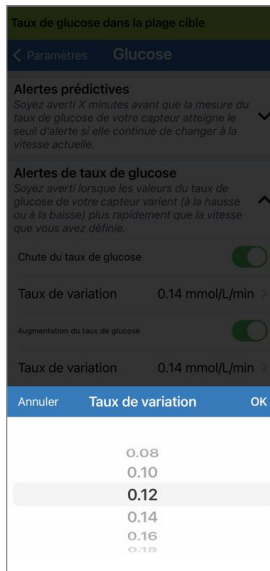

Régler les rappels d'étalonnage quotidiens

Vous pouvez définir des rappels d'étalonnage aux horaires qui vous conviennent si vous le souhaitez. Vous continuerez à recevoir les notifications et alertes d'étalonnage générées par le système.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Paramètre par défaut | DÉSACTIVÉ |
| Plage de paramétrage | Heure de la journée par incréments de 1 minute |
| Paramètre Activé/Désactivé | Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Aucun rappel n'apparaît si cette fonction n'est pas activée. |
| Remarques | Vous pouvez définir un ou deux rappels quotidiens. Notification sonore et alertes visuelles sur l'écran de votre téléphone uniquement. Aucune vibration du transmetteur. Si vous supprimez et réinstallez l'application mobile, vous devez redéfinir ces rappels. Ils ne sont pas enregistrés dans l'historique des alertes. Si vous jumelez un nouveau transmetteur avec l'application existante, les réglages restent intacts. Voir <i>Ne pas déranger sur l'application Eversense App et les appareils mobiles</i> pour plus d'informations. |

8


Régler les informations système

L'écran **SYSTÈME** permet de consulter et de modifier d'autres réglages sur votre système MGC Eversense E3.

1. Touchez **Menu > Paramètres > Système** pour afficher l'écran **SYSTÈMES**.

2. Sur l'écran **SYSTÈMES**, vous pouvez toucher les options suivantes pour les régler :

- **Unités de glucose.** Unité de mesure de toutes vos valeurs du taux de glucose.
Pour pouvoir modifier ce paramètre, l'application doit être réinstallée.
- **Nom.** Le numéro de série de votre Smart Transmetteur. Vous pouvez aussi taper sur le numéro de série qui apparaît ici et donner un nom personnalisé à votre Smart Transmetteur.
- **Capteur relié.** Le numéro de série du capteur relié en ce moment au Smart Transmetteur. Tapez sur cette fonction pour accéder à la capacité de relier ou de rétablir la liaison avec un capteur.

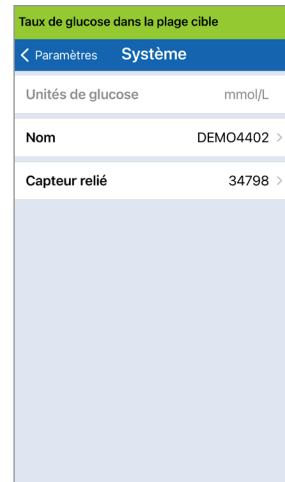


Rétablir la liaison avec un capteur

IMPORTANT : ne rétablissez pas la liaison avec votre capteur sans en avoir reçu l'instruction de la part du support clientèle. Le fait de rétablir la liaison avec le capteur place le système en phase d'initialisation et vous devez réaliser 4 étalonnages au moyen d'une mesure de glycémie par piqûre au doigt dans un délai de 36 heures.

8

1. Vérifiez auprès du support clientèle si vous devez rétablir la liaison avec votre capteur.


2. Touchez **Capteur relié**.

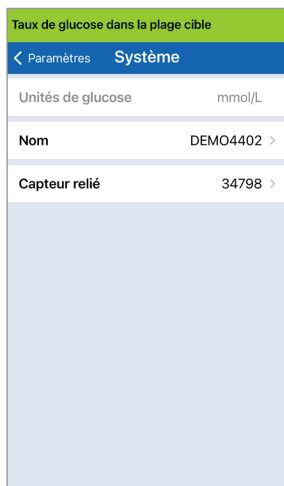

3. Touchez **Rétablir liaison avec capteur détecté**.



4. Touchez **Annuler** ou **OK** pour continuer.

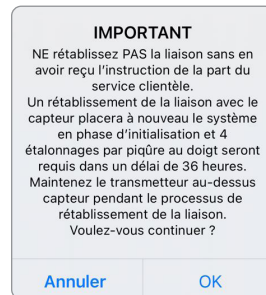

5. Touchez **Annuler** ou **Rétablir la liaison**.



6. Le jumelage commence. Chaque étape est cochée lorsqu'elle est terminée. Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à 10 minutes. **N'ENLEVEZ PAS** votre transmetteur de son emplacement tant que la troisième étape n'a pas été confirmée.

| Initialisation Phase (4 étalonnages restants) | |
|---|---------|
| Capteur relié | Terminé |
| Capteur relié | 34798 |
| Capteur détecté | 34798 |
| 1. Récupération des données du ca... ✓ | |
| 2. Liaison au capteur : 34798 ✓ | |
| 3. Jumelage terminé ✓ | |

Placez le transmetteur sur le capteur pour achever le jumelage. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.

OK

Si le Smart Transmetteur est retiré du site du capteur, le système affiche une notification.

| Étalonnage en cours (14 min, 46 sec) | |
|---|---------------|
| < Système | Capteur relié |
| Capteur relié | 245667 |
| Capteur détecté | 245667 |
| Rétablir liaison avec capteur détecté | |
| <i>La fonction de rétablissement de la liaison avec le capteur n'est pas disponible pour le moment. Pour plus d'informations, reportez-vous à votre guide de l'utilisateur.</i> | |

Remarque : le bouton Rétablir la liaison n'est pas disponible dans les conditions suivantes :

- La pile de votre transmetteur doit être rechargée ou est vide.
- Un étalonnage est en cours.
- Avant d'avoir relié un capteur.
- Certaines alertes de remplacement du capteur.
- Si l'une des alertes ci-dessous est active :
 - Fin de vie du transmetteur
 - Erreur Heure du système
 - Mise hors-service du capteur

Régler les tonalités


L'écran **PARAMÈTRES AUDIO** affiche les réglages audio des alertes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Cet écran permet aussi d'entrer un paramètre de rappel pour les alertes indiquées et de choisir que les alertes Hypoglycémie et Hypoglycémie, glycémie hors plage contournent les réglages audio de votre téléphone (iOS 12 et ultérieur et Android 6 et ultérieur).

1. Touchez **Menu > Paramètres > Paramètres audio** pour afficher l'écran **PARAMÈTRES AUDIO**.

8



2. Touchez chaque alerte pour sélectionner le son correspondant. Touchez **Retour** pour retourner à l'écran **PARAMÈTRES AUDIO**.

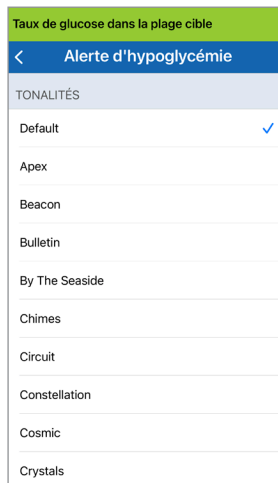


IMPORTANT : assurez-vous que le son est bien en marche sur votre appareil mobile. Si vous coupez le son de votre appareil mobile, vous n'entendrez plus aucune tonalité de l'application.

Le réglage des rappels permet de définir combien de fois une alerte se répète après avoir reçu une alerte d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.

3. Touchez chacun des rappels d'alerte pour voir combien de fois l'alerte se répétera.

- Touchez **OK** lorsque vous avez fini.

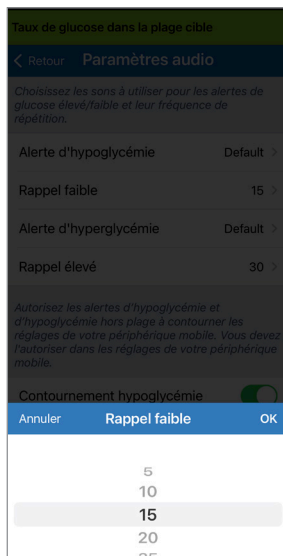

Réglage de Contournement hypoglycémie

Si votre appareil mobile utilise iOS 12 et versions ultérieures ou Android 6 et versions ultérieures, vous pouvez faire en sorte que les alertes d'hypoglycémie et d'hypoglycémie, glycémie hors plage d'Eversense contournent les paramètres audio de votre appareil mobile. Lorsque cette fonction est activée, les alertes d'hypoglycémie et d'hypoglycémie, glycémie hors plage sont émises au volume maximum de votre téléphone. Vous ne pouvez pas modifier le niveau de volume pour ce paramètre de contournement. Cela vous permet de continuer à recevoir les alertes d'hypoglycémie et d'hypoglycémie, glycémie hors plage sur votre téléphone même s'il est en mode Silence ou Ne pas déranger. Vous devez autoriser cela dans les paramètres de votre appareil mobile.

Appareils iOS

1. Touchez le bouton pour activer le contournement.

Taux de glucose dans la plage cible

Retour Paramètres audio

Choisissez les sons à utiliser pour les alertes de glucose élevé/faible et leur fréquence de répétition.

Alerte d'hypoglycémie Default >

Rappel faible 15 >

Alerte d'hyperglycémie Default >

Rappel élevé 30 >

Autorisez les alertes d'hypoglycémie et d'hypoglycémie hors plage à contourner les réglages de votre périphérique mobile. Vous devez l'autoriser dans les réglages de votre périphérique mobile.

Contournement hypoglycémie

Choisissez quand la notification de transmetteur déconnecté est émise.

Minutes 5 >

Désactivez toutes les alertes et notifications non-critiques pour qu'elles ne s'affichent plus.

2. Touchez Paramètres.

Vous devez autoriser Eversense à contourner le réglage Ne pas déranger de votre périphérique mobile. Lorsque les alertes d'hypoglycémie et d'hypoglycémie hors plage sont activées, elles sont émises au volume maximum de votre téléphone. Vous ne pouvez pas modifier le volume pour ce paramètre de contournement.

Annuler

Paramètres

3. Touchez Autoriser.



« Eversense CGM » souhaite vous envoyer des alertes critiques.


Les alertes critiques émettent toujours un son et apparaissent sur l'écran verrouillé, même si le son de votre iPhone est coupé ou si « Ne pas déranger » est activé. Pour les gérer, allez dans Réglages.

Refuser

Autoriser

4. Vous pouvez alors activer l'option Contournement hypoglycémie.

Votre système vous préviendra des alertes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie, glycémie hors plage même si le mode Silencieux/Vibreur ou Ne pas déranger est activé sur votre appareil Apple.

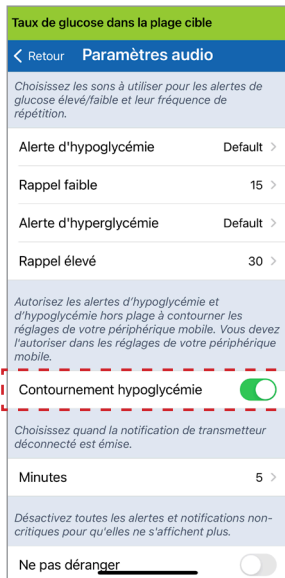

Remarque : le fonctionnement est similaire à celui d'une fonction de réveil, qui sonne même si le son du téléphone est coupé.




Remarque : si vous touchez **Refuser** à l'étape 3, vous ne pouvez pas activer le paramètre Contournement hypoglycémie. Pour activer ce réglage une autre fois, lorsque vous touchez **Paramètres** à l'étape 2, les paramètres Eversense apparaissent sur la page de paramètres de votre appareil mobile. Touchez **Notifications > Autoriser les alertes critiques**. Vous pouvez alors activer Contournement hypoglycémie dans l'application Eversense App.

Veillez autoriser Eversense à contourner le réglage **Ne pas déranger** de votre périphérique mobile. Lorsque les alertes d'hypoglycémie et d'hypoglycémie hors plage sont activées, elles sont émises au volume maximum de votre téléphone. Vous ne pouvez pas modifier le volume pour ce paramètre de contournement.

Annuler

Paramètres


8

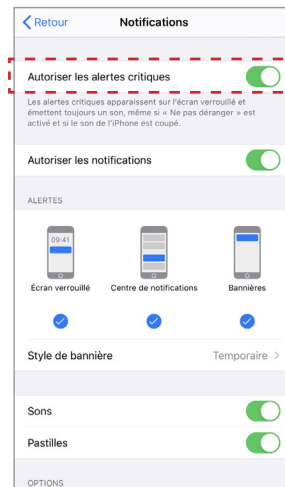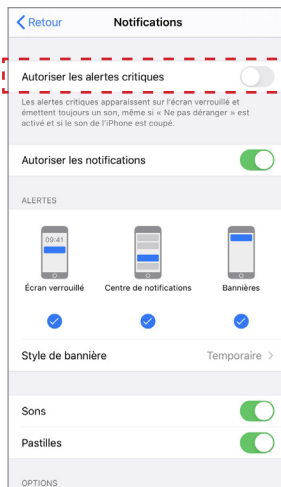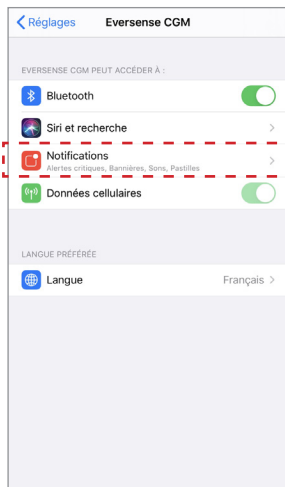


Appareils Android

Pour les appareils avec Android 6 et ultérieur :


1. Touchez le bouton pour activer le contournement.

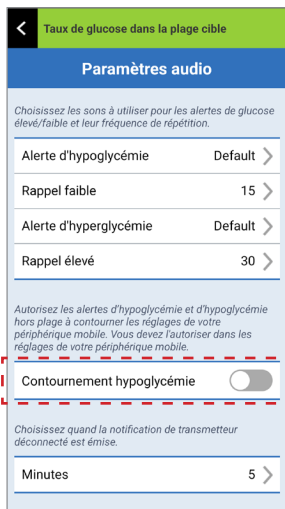

2. Touchez Paramètres.

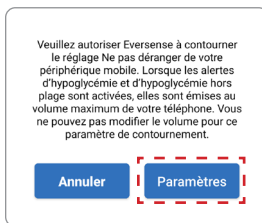

3. Touchez Eversense sur la page Accès à Ne pas déranger.

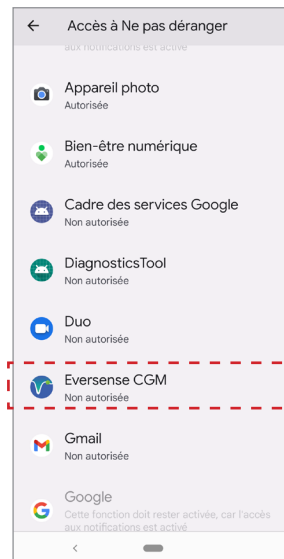

4. Touchez **Autoriser**.


Autoriser l'accès au mode Ne pas déranger pour Eversense CGM?

L'application disposera d'une autorisation d'activation ou de désactivation du mode Ne pas déranger et de modification des paramètres associés.

Refuser **Autoriser**


8

5. Touchez le bouton en regard d'Eversense pour autoriser Eversense à contourner les paramètres Ne pas déranger.

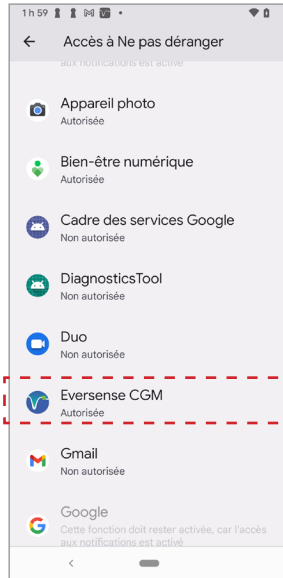

6. Retournez à l'application mobile MGC Eversense.

7. Touchez le bouton à bascule de Contournement hypoglycémie pour recevoir les alertes d'hypoglycémie et d'hypoglycémie, glycémie hors plage au volume maximum même si le mode Silencieux, Vibreur ou Ne pas déranger est activé sur votre appareil.

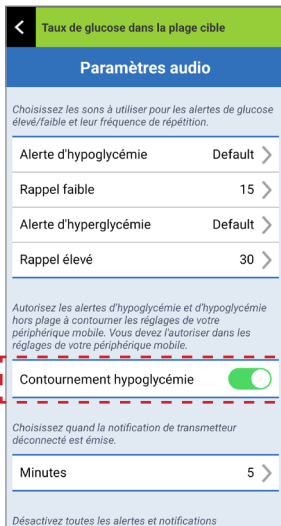


Remarque : le fonctionnement est similaire à celui d'une fonction de réveil, qui sonne même si le son du téléphone est coupé.

Paramètre Transmetteur déconnecté

Il peut arriver que la connexion Bluetooth soit interrompue entre votre Smart Transmetteur et votre appareil mobile. Plusieurs causes sont possibles : les appareils sont hors de portée l'un de l'autre, la pile du Smart Transmetteur est à plat ou la fonctionnalité Bluetooth est désactivée dans les paramètres de votre téléphone. Vous pouvez personnaliser le délai avant que le système vous signale une interruption de communication. Il peut être de 5 à 30 minutes après la perte de la connexion. En l'absence de communication entre le Smart Transmetteur et l'application, vous recevez uniquement des alertes vibratoires du Smart Transmetteur. Voir la section suivante concernant le mode Ne pas déranger.


8

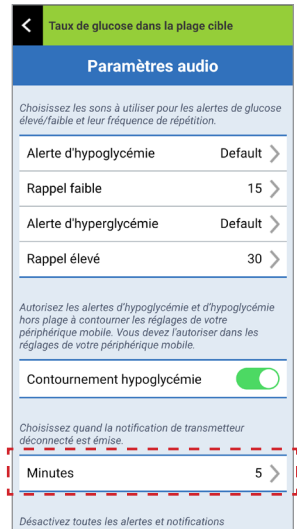

L'écran **PARAMÈTRES AUDIO** permet également d'activer et désactiver le mode Ne pas déranger.

- **Ne pas déranger.** Vous permet d'activer ou de désactiver le mode « Ne pas déranger » dans l'application ou sur le Smart Transmetteur.
- **Désactivé :** TOUTES les alertes et notifications seront fournies par le Smart Transmetteur et l'application, qu'elles soient critiques ou non.
- **Activé :** SEULES les alertes critiques seront fournies par l'application et les alertes par vibreur du Smart Transmetteur.

Remarque : lorsque vous activez le mode Ne pas déranger sur votre appareil mobile, vous interrompez la réception et les notifications provenant de votre application Eversense. L'icône Ne pas déranger apparaît sur l'écran d'accueil. Vous trouverez une liste des alertes sous *Description des alertes*.

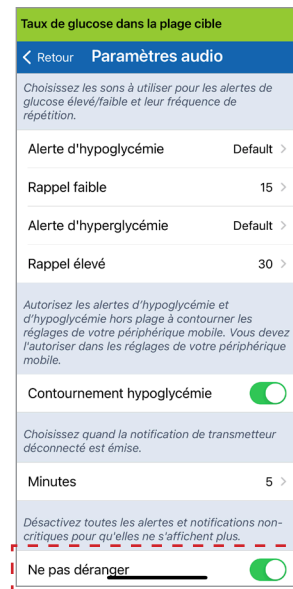

Ne pas déranger sur l'application Eversense App et les appareils mobiles

8

| | Désactivé sur l'application Eversense App ; désactivé sur l'appareil mobile | Activé sur l'application Eversense App ; désactivé sur l'appareil mobile | Désactivé sur l'application Eversense App ; activé sur l'appareil mobile | Activé sur l'application Eversense App ; activé sur l'appareil mobile |
|--|---|--|--|---|
| Vibration du transmetteur (alertes non critiques et notifications) | Oui | Non | Oui | Non |
| Affichage dans l'application Eversense App, son du téléphone et vibration du téléphone (alertes non critiques et notifications) | Oui | Non | Non | Non |
| Vibration du transmetteur (alertes critiques) | Oui | Oui | Oui | Oui |

| | Désactivé sur l'application Eversense App ; désactivé sur l'appareil mobile | Activé sur l'application Eversense App ; désactivé sur l'appareil mobile | Désactivé sur l'application Eversense App ; activé sur l'appareil mobile | Activé sur l'application Eversense App ; activé sur l'appareil mobile |
|---|---|--|--|---|
| Affichage dans l'application Eversense App, son du téléphone et vibration du téléphone (alertes critiques) | Oui | Oui | Non | Non |
| Rappels d'étalonnage (notification du téléphone) | Oui | Oui | Non | Non |
| Alerte d'hypoglycémie (contournement activé) | Oui | Oui | Oui | Oui |


IMPORTANT : les systèmes d'exploitation de certains téléphones permettent d'activer les alertes d'hypoglycémie pour contourner les paramètres audio de votre téléphone. Voir *Paramètres audio* pour plus d'informations.

Configurer le profil temporaire


Durant des activités ou si les conditions sortent de vos habitudes quotidiennes, vous pourrez avoir besoin d'entrer des paramètres du glucose différents de ceux que vous entrez normalement. L'écran **PROFIL TEMPORAIRE** permet de modifier temporairement les paramètres d'alerte et de cible de glucose pendant la durée de votre choix. Une fois la durée du Profil temporaire écoulée, les paramètres du glucose standard entrés dans **Paramètres > Glucose** sont rétablis automatiquement.

8



1. Touchez **Menu > Paramètres > Profil temporaire** pour afficher l'écran **PROFIL TEMPORAIRE**.

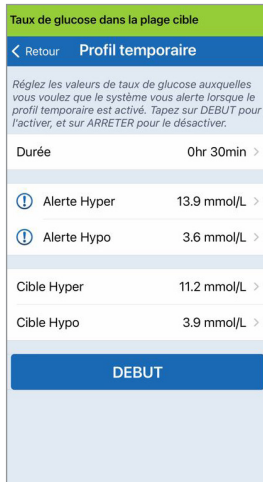

2. Sélectionnez la durée. Vous pouvez configurer un profil temporaire pour plus de 36 heures par incréments de 30 minutes.

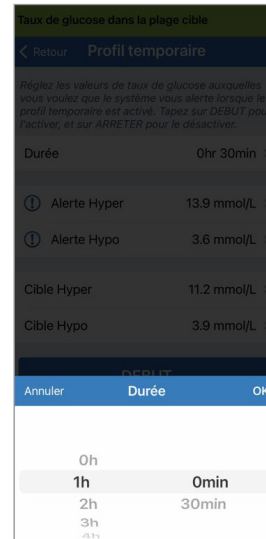


3. Définissez les niveaux d'alerte d'hypoglycémie et d'hyperglycémie et les niveaux de cible Hypo et cible Hyper souhaités. Touchez DEBUT.

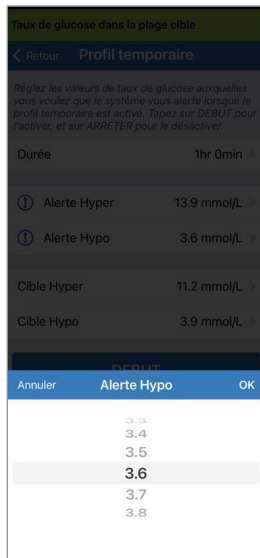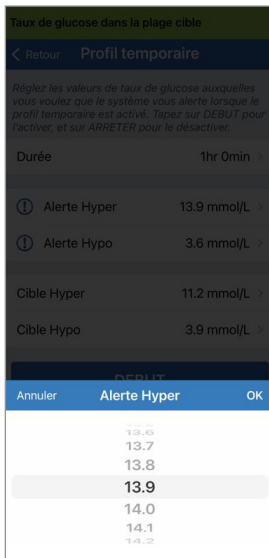


Le profil temporaire n'est plus modifiable tant qu'il est activé.

Pendant qu'un profil temporaire est actif, l'icône de profil temporaire apparaît sur l'écran **MON GLUCOSE**.

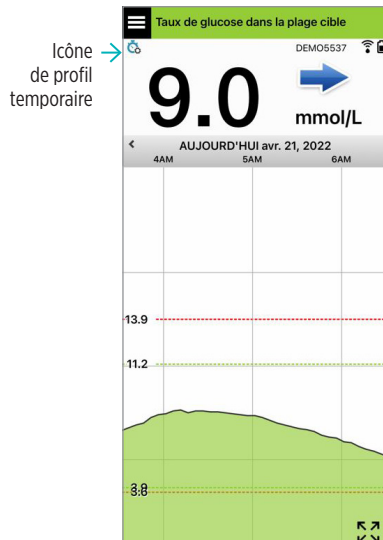

Une fois la durée du Profil temporaire écoulée, l'application l'indique et l'icône de profil temporaire n'apparaît plus sur l'écran **MON GLUCOSE**.

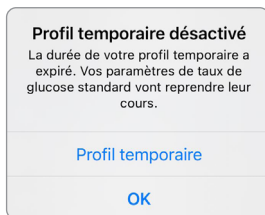

8

Pour mettre fin au profil temporaire avant le délai défini, accédez à **Paramètres > Profil temporaire** et touchez **ARRETER**.



9. Description des alertes

Cette section décrit les différentes alertes et notifications qui peuvent apparaître sur votre application Eversense App et les dispositions que vous aurez parfois à prendre.

Votre système MGC vous fournit des alertes et des notifications relatives aux valeurs de glucose et à l'état du système tel qu'indiqué sur votre Smart Transmetteur et sur votre appareil mobile. Le Smart Transmetteur vous donne des alertes par vibreur lorsqu'un niveau d'alerte est atteint. L'application de l'appareil mobile émet une alerte sonore et affiche des messages sur l'écran **MON GLUCOSE**. Le tableau ci-dessous décrit les schémas de vibration du Smart Transmetteur et les messages qui apparaissent sur votre application.

| Alertes et notifications | Schéma de vibration du Smart Transmetteur | Indicateur d'alerte de l'application |
|--|---|--------------------------------------|
| Alertes lorsqu'aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche Requiert une action immédiate et appropriée. | 3 longues vibrations | LE MESSAGE APPARAÎT EN JAUNE |
| Alerte d'hypoglycémie Requiert une action immédiate et appropriée. | 3 courtes vibrations X3 | LE MESSAGE APPARAÎT EN JAUNE |
| Alertes prédictives d'hypoglycémie et d'hypoglycémie, glycémie hors plage Requiert une action immédiate et appropriée. | 3 vibrations courtes | LE MESSAGE APPARAÎT EN JAUNE |

| Alertes et notifications | Schéma de vibration du Smart Transmetteur | Indicateur d'alerte de l'application |
|--|--|--------------------------------------|
| <p>Alertes d'hyperglycémie Alerte d'hyperglycémie, valeur prédictive élevée et valeur élevée hors limite. Requier une action immédiate et appropriée.</p> | 1 longue vibration, suivie de 2 vibrations courtes | LE MESSAGE APPARAÎT EN JAUNE |
| <p>Alertes liées à des problèmes moins critiques Nécessitent une action, mais pas nécessairement critiques. Voir les exemples dans la section qui suit.</p> | 1 vibration courte | LE MESSAGE APPARAÎT EN JAUNE |
| <p>Alerte Charger le Smart Transmetteur La pile de votre Smart Transmetteur est faible et doit être rechargée.</p> | 3 vibrations courtes, puis 1 longue vibration x 2 | LE MESSAGE APPARAÎT EN JAUNE |
| <p>Notifications Nécessitent une action mais pas critique. Voir les exemples dans la section qui suit.</p> | 1 vibration courte | LE MESSAGE APPARAÎT EN BLEU |

Historique des alertes

L'écran **HISTORIQUE DES ALERTES** indique les alertes et notifications que vous avez reçues.

On utilise les icônes suivantes pour indiquer le niveau de gravité des messages.



Alertes



Notifications



Alerte liées au glucose




Alertes concernant la pile

Remarque : lorsque vous recevez 2 alertes ou plus qui n'ont pas été acquittées, l'application propose une option **Les ignorer toutes**. Ceci peut se produire lorsque votre appareil mobile a été hors de portée de votre Smart Transmetteur, puis re-synchronisé. Vous pouvez consulter chaque alerte dans l'**Historique des alertes**.

1. Touchez **Menu** > **Historique des alertes**.


- L'écran **HISTORIQUE DES ALERTES** répertorie TOUTES les alertes et notifications de la journée.
- Touchez l'un des messages pour plus d'informations.

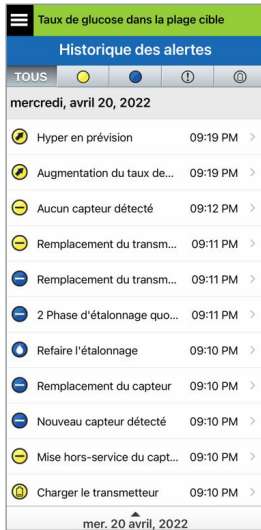

Exemple de TOUS

2. Vous pouvez choisir d'inclure uniquement certains messages (alertes et notifications, etc.) à consulter en touchant des icônes d'alertes.

- Touchez **TOUS**, puis touchez les icônes en haut de l'écran pour sélectionner uniquement les types d'alertes que vous voulez afficher.
- Touchez **Menu** lorsque vous avez terminé.

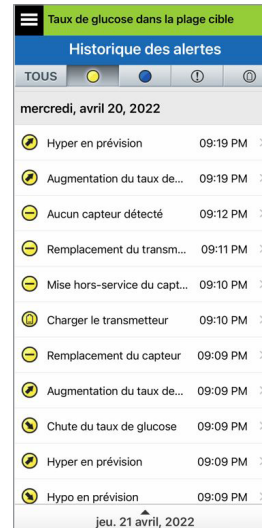



Exemple des alertes uniquement

Description des alertes et actions requises

Le tableau suivant liste les alertes et les notifications que vous pouvez recevoir sur l'application Eversense App.



IMPORTANT : les alertes marquées d'un * ne peuvent pas se désactiver à l'aide du mode Ne pas déranger des paramètres de l'application ou dans le Smart Transmetteur.

Alertes
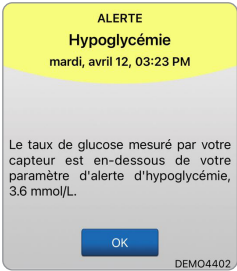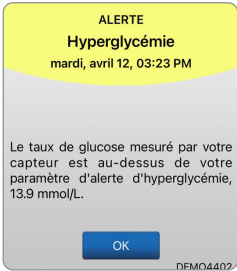
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  ALERTE Hypoglycémie mardi, avril 12, 03:23 PM Le taux de glucose mesuré par votre capteur est en-dessous de votre paramètre d'alerte d'hypoglycémie, 3.6 mmol/L. OK DEMO440Z |  ALERTE Hyperglycémie mardi, avril 12, 03:23 PM Le taux de glucose mesuré par votre capteur est au-dessus de votre paramètre d'alerte d'hyperglycémie, 13.9 mmol/L. OK DEMO440Z |
| Description | Hypoglycémie* Apparaît à l'intervalle que vous avez entré dans les paramètres audio lorsque les valeurs du taux de glucose de votre capteur sont en-dessous ou correspondent au niveau d'alerte d'hypoglycémie que vous avez configuré. L'intervalle du rappel par défaut est de 15 minutes. | Hyperglycémie Apparaît à l'intervalle que vous avez entré dans les paramètres audio lorsque les valeurs du taux de glucose de votre capteur sont au-dessus ou correspondent au niveau d'alerte d'hyperglycémie que vous avez configuré. L'intervalle du rappel par défaut est de 30 minutes. |
| Actions | Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si vos symptômes ne correspondent pas à la valeur du taux de glucose capteur, confirmez votre taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique. | Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si vos symptômes ne correspondent pas à la valeur du taux de glucose capteur, confirmez votre taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique. |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
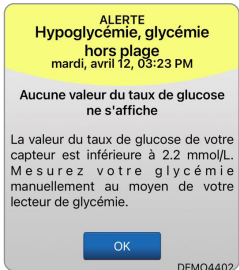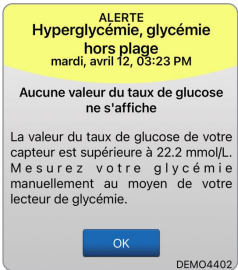
| | | |
|------------------------------|--|---|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Hypoglycémie, glycémie hors plage mardi, avril 12, 03:23 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>La valeur du taux de glucose de votre capteur est inférieure à 2,2 mmol/L. Mesurez votre glycémie manuellement au moyen de votre lecteur de glycémie.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Hyperglycémie, glycémie hors plage mardi, avril 12, 03:23 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>La valeur du taux de glucose de votre capteur est supérieure à 22,2 mmol/L. Mesurez votre glycémie manuellement au moyen de votre lecteur de glycémie.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Hypoglycémie, glycémie hors plage*</p> <p>Apparaît lorsque votre valeur du taux de glucose est inférieure à 2,2 mmol/l.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne peut être affichée (seulement LO apparaît sur l'écran MON GLUCOSE).</p> | <p>Hyperglycémie, glycémie hors plage*</p> <p>Apparaît lorsque votre valeur du taux de glucose est supérieure à 22,2 mmol/l.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne peut être affichée (seulement HI apparaît sur l'écran MON GLUCOSE).</p> |
| Actions | <p>Confirmez votre valeur du taux de glucose au moyen d'un test au lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique. Une fois que la valeur du taux de glucose capteur arrive à ou dépasse 2,2 mmol/l, les valeurs se réaffichent.</p> | <p>Confirmez votre valeur du taux de glucose au moyen d'un test au lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> <p>Une fois que la valeur du taux de glucose capteur arrive à ou tombe en-dessous de 22,2 mmol/l, les valeurs se réaffichent.</p> |

Description des alertes et actions requises (suite)



Alertes
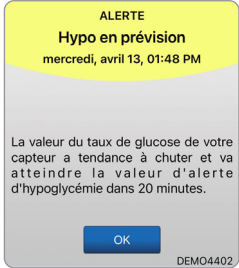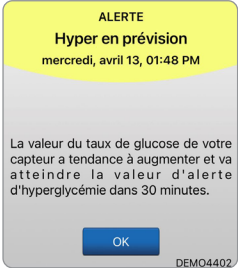
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  |  |
| Description | <p>Hypo en prévision</p> <p>Ce message apparaît toutes les 60 minutes lorsque les valeurs de votre taux de glucose dévient à la baisse et qu'elles atteignent le niveau d'alerte d'hypoglycémie dans l'intervalle que vous avez configuré dans les paramètres.</p> | <p>Hyper en prévision</p> <p>Ce message apparaît toutes les 60 minutes lorsque les valeurs de votre taux de glucose dévient à la hausse et qu'elles atteignent le niveau d'alerte d'hyperglycémie dans l'intervalle que vous avez configuré dans les paramètres.</p> |
| Actions | <p>Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si vos symptômes correspondent pas aux valeurs de taux de glucose capteur ou à ce qu'indique l'alerte, confirmez votre valeur du taux de glucose avec un test au lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> | <p>Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si vos symptômes correspondent pas aux valeurs de taux de glucose capteur ou à ce qu'indique l'alerte, confirmez votre valeur du taux de glucose avec un test au lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> |

Description des alertes et actions requises (suite)



Alertes

9
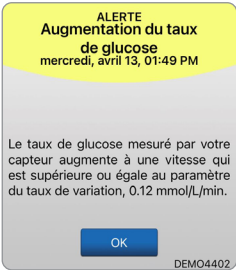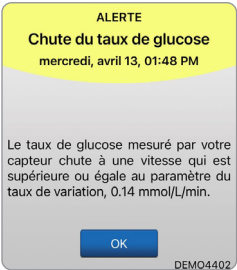
| | | |
|------------------------------|---|--|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Augmentation du taux de glucose mercredi, avril 13, 01:49 PM</p> <p>Le taux de glucose mesuré par votre capteur augmente à une vitesse qui est supérieure ou égale au paramètre du taux de variation, 0,12 mmol/L/min.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Chute du taux de glucose mercredi, avril 13, 01:48 PM</p> <p>Le taux de glucose mesuré par votre capteur chute à une vitesse qui est supérieure ou égale au paramètre du taux de variation, 0,14 mmol/L/min.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Augmentation du taux de glucose</p> <p>Ce message apparaît toutes les 60 minutes lorsque les valeurs de votre taux de glucose s'élèvent à une vitesse supérieure ou égale au taux de variation que vous avez entré dans les paramètres.</p> | <p>Chute du taux de glucose</p> <p>Ce message apparaît toutes les 60 minutes lorsque les valeurs de votre taux de glucose chutent à une vitesse supérieure ou égale au taux de variation que vous avez entré dans les paramètres.</p> |
| Actions | <p>Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si vos symptômes correspondent pas aux valeurs de taux de glucose capteur ou à ce qu'indique l'alerte, confirmez votre valeur du taux de glucose avec un test au lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> | <p>Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si vos symptômes correspondent pas aux valeurs de taux de glucose capteur ou à ce qu'indique l'alerte, confirmez votre valeur du taux de glucose avec un test au lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> |


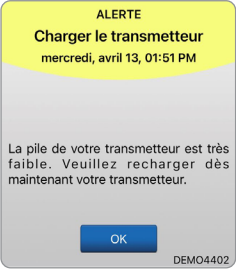
Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
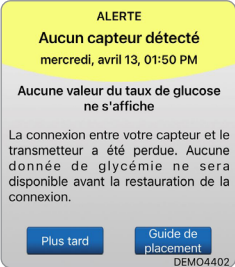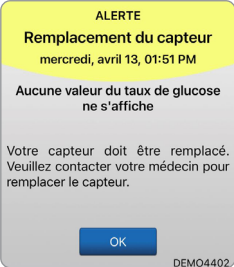
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  |  |
| Description | <p>Aucun capteur détecté*</p> <p>Apparaît quand la connexion est perdue entre votre capteur et le transmetteur.</p> <p>Aucun taux de glucose n'est disponible tant que la connexion n'est pas rétablie.</p> | <p>Remplacement du capteur*</p> <p>Apparaît une fois que les autotests du système ont détecté que le capteur ne peut plus fournir de valeur de taux de glucose.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne s'affichera tant que vous n'aurez pas remplacé le capteur.</p> |
| Actions | <p>Utilisez le Guide de placement pour vous aider à mettre en place le Smart Transmetteur au-dessus du capteur jusqu'à ce qu'il signale une connexion.</p> | <p>Prenez rendez-vous avec votre médecin ou professionnel de santé pour remplacer votre capteur.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Remplacement du capteur samedi, avril 16, 11:38 AM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Votre capteur est arrivé à la fin de sa durée de vie. Veuillez prendre rendez-vous avec votre professionnel de santé pour programmer un remplacement.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Charger le transmetteur mercredi, avril 13, 01:51 PM</p> <p>La pile de votre transmetteur est très faible. Veuillez recharger dès maintenant votre transmetteur.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Remplacement du capteur*</p> <p>Apparaît une fois que la durée de vie du capteur est écoulée.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne s'affichera tant que vous n'aurez pas remplacé le capteur.</p> | <p>Charger le Smart Transmetteur*</p> <p>Ce message apparaît lorsque le niveau de charge de la pile du Smart Transmetteur est très faible et qu'il faut la recharger très prochainement.</p> |
| Actions | <p>Prenez rendez-vous avec votre médecin ou professionnel de santé pour remplacer votre capteur.</p> | <p>Chargez votre Smart Transmetteur dès que possible.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
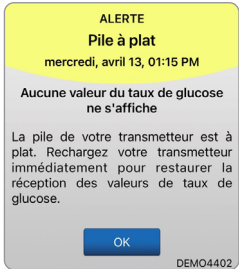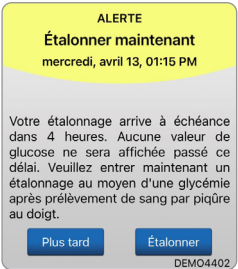
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Pile à plat mercredi, avril 13, 01:15 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>La pile de votre transmetteur est à plat. Rechargez votre transmetteur immédiatement pour restaurer la réception des valeurs de taux de glucose.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Étalonner maintenant mercredi, avril 13, 01:15 PM</p> <p>Votre étalonnage arrive à échéance dans 4 heures. Aucune valeur de glucose ne sera affichée passé ce délai. Veuillez entrer maintenant un étalonnage au moyen d'une glycémie après prélèvement de sang par piqûre au doigt.</p> <p>Plus tard Étalonner</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Pile à plat*</p> <p>Apparaît lorsque la pile de votre Smart Transmetteur est à plat et doit être rechargée.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affichera tant que le Smart Transmetteur n'aura pas été rechargé.</p> | <p>Étalonner maintenant</p> <p>Indique que votre étalonnage doit être effectué. Sans étalonnage dans les 4 heures, les valeurs de taux de glucose n'apparaîtront plus.</p> |
| Actions | <p>Chargez immédiatement le Smart Transmetteur. Retirez le transmetteur de votre corps avant de le connecter à une source d'alimentation.</p> | <p>Touchez Étalonner pour entrer une valeur d'étalonnage.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
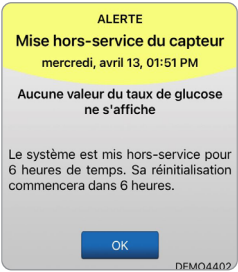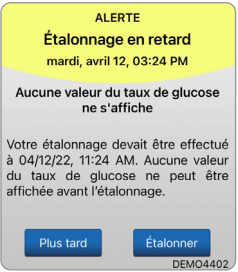
| | | |
|------------------------------|--|---|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Mise hors-service du capteur mercredi, avril 13, 01:51 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Le système est mis hors-service pour 6 heures de temps. Sa réinitialisation commencera dans 6 heures.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Étalonnage en retard mardi, avril 12, 03:24 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Votre étalonnage devait être effectué à 04/12/22, 11:24 AM. Aucune valeur du taux de glucose ne peut être affichée avant l'étalonnage.</p> <p>Plus tard Étalonner</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Mise hors-service du capteur</p> <p>Ce message apparaît lorsque les vérifications internes du système détectent qu'il faut refaire la phase d'initialisation pour faire des étalonnages supplémentaires.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne s'affichera avant d'avoir réussi deux étalonnages.</p> | <p>Étalonnage en retard</p> <p>Apparaît lorsque l'étalonnage de votre système est en retard. (16 heures avec 2 Phase d'étalonnage quotidien et 28 heures avec 1 phase d'étalonnage quotidien).</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affichera tant que vous n'avez pas fait un étalonnage.</p> |
| Actions | <p>La réinitialisation du système commence 6 heures plus tard. Les valeurs du glucose s'affichent quelques minutes après le second étalonnage qui a réussi durant la phase d'initialisation.</p> | <p>Faites un étalonnage par piqûre au doigt pour pouvoir reprendre l'affichage des valeurs du taux de glucose.</p> |

Description des alertes et actions requises (suite)



Alertes
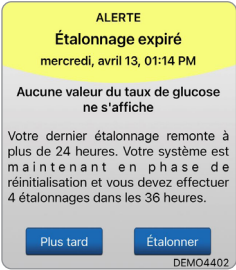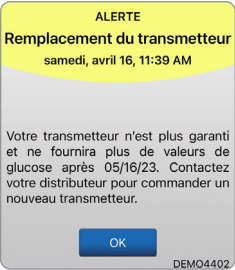
| | | |
|------------------------------|--|---|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Étalonnage expiré mercredi, avril 13, 01:14 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Votre dernier étalonnage remonte à plus de 24 heures. Votre système est maintenant en phase de réinitialisation et vous devez effectuer 4 étalonnages dans les 36 heures.</p> <p>Plus tard Étalonner</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Remplacement du transmetteur samedi, avril 16, 11:39 AM</p> <p>Votre transmetteur n'est plus garanti et ne fournira plus de valeurs de glucose après 05/16/23. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Étalonnage expiré</p> <p>Apparaît lorsque votre dernier étalonnage remonte à plus de 24 heures avec 2 Phase d'étalonnage quotidien ou remonte à plus de 40 heures avec 1 phase d'étalonnage quotidien. Le système revient en phase d'initialisation.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affichera tant que vous n'avez pas fait un étalonnage.</p> | <p>Fin de vie du transmetteur Jour 366*</p> <p>Apparaît tous les 7 jours lorsque votre transmetteur a été utilisé pendant 365 jours et que votre transmetteur n'est plus garanti. Après 395 jours d'utilisation, votre transmetteur ne fournit plus de valeur de taux de glucose.</p> |
| Actions | <p>En phase d'initialisation, vous devez faire 4 tests d'étalonnage par piqûre au doigt, espacés de 2 à 12 heures les uns des autres. L'affichage du taux de glucose reprend son cours après le second étalonnage par piqûre au doigt réussi.</p> | <p>Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> |

Description des alertes et actions requises (suite)



Remarque : Quelle que soit la phase d'étalonnage quotidien, vous serez invité à réaliser un nouvel étalonnage si une entrée d'étalonnage diffère fortement de la valeur du taux de glucose capteur du système. Après 16 heures sans étalonnage, aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche et après 24 heures sans étalonnage, le système retourne en phase d'initialisation.

Alertes
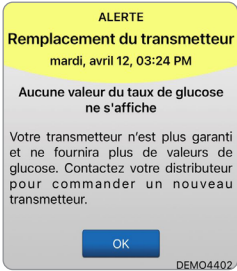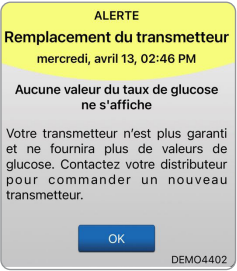
| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 9 Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Remplacement du transmetteur mardi, avril 12, 03:24 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Votre transmetteur n'est plus garanti et ne fournira plus de valeurs de glucose. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Remplacement du transmetteur mercredi, avril 13, 02:46 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Votre transmetteur n'est plus garanti et ne fournira plus de valeurs de glucose. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Fin de vie du transmetteur Jour 395*</p> <p>Apparaît lorsque votre transmetteur n'est plus garanti depuis 30 jours.</p> <p>Après cette alerte, aucune valeur de taux de glucose ne peut s'afficher jusqu'à ce que vous remplaciez votre transmetteur.</p> | <p>Fin de vie du transmetteur Jour 396*</p> <p>Apparaît lorsque votre transmetteur a été utilisé pendant 395 jours. Aucune valeur de taux de glucose ne peut s'afficher jusqu'à ce que vous remplaciez votre transmetteur. Si votre transmetteur a atteint la fin de sa durée de vie, il ne peut pas être relié à un capteur.</p> |
| Actions | <p>Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> | <p>Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> |

Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
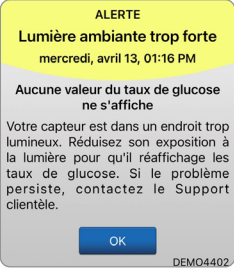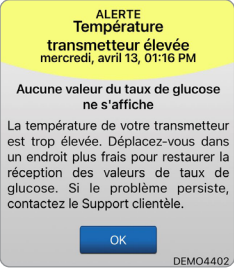
| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Lumière ambiante trop forte mercredi, avril 13, 01:16 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Votre capteur est dans un endroit trop lumineux. Réduisez son exposition à la lumière pour qu'il réaffiche les taux de glucose. Si le problème persiste, contactez le Support clientèle.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Température transmetteur élevée mercredi, avril 13, 01:16 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>La température de votre transmetteur est trop élevée. Déplacez-vous dans un endroit plus frais pour restaurer la réception des valeurs de taux de glucose. Si le problème persiste, contactez le Support clientèle.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Lumière ambiante trop forte</p> <p>Apparaît toutes les 60 minutes lorsque votre capteur reçoit trop de lumière ambiante, ce qui affecte sa capacité à communiquer avec le Smart Transmetteur.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affichera tant que vous n'avez pas réduit la lumière ambiante.</p> | <p>Température du Smart Transmetteur élevée*</p> <p>Ce message apparaît toutes les 20 minutes lorsque votre Smart Transmetteur est trop chaud.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que la température du Smart Transmetteur n'est pas revenue dans la plage normale de fonctionnement.</p> |

Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes

9

Actions

Réduisez la lumière ambiante en faisant l'une au moins des choses suivantes :



- Mettez-vous dans un endroit moins lumineux.
- Placez un matériau sombre sur le Smart Transmetteur.
- Portez le Smart Transmetteur sous un vêtement.

Faites refroidir le Smart Transmetteur en le mettant dans un environnement plus frais. Une fois que la température du Smart Transmetteur est en-dessous de 42 °C (108 °F), il se remet à afficher les valeurs du taux de glucose.

Vous pouvez temporairement enlever le Smart Transmetteur pour le laisser refroidir. Une fois que le Smart Transmetteur est revenu à une température plus basse, assurez-vous de le remettre en place au-dessus du capteur.



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
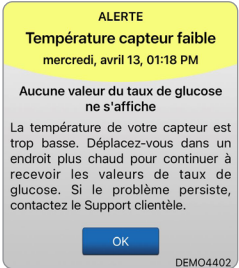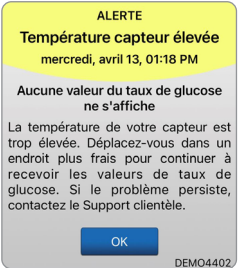
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Température capteur faible mercredi, avril 13, 01:18 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>La température de votre capteur est trop basse. Déplacez-vous dans un endroit plus chaud pour continuer à recevoir les valeurs de taux de glucose. Si le problème persiste, contactez le Support clientèle.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Température capteur élevée mercredi, avril 13, 01:18 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>La température de votre capteur est trop élevée. Déplacez-vous dans un endroit plus frais pour continuer à recevoir les valeurs de taux de glucose. Si le problème persiste, contactez le Support clientèle.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Température capteur faible*</p> <p>Ce message apparaît toutes les 20 minutes lorsque la température du capteur est trop basse.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que la température du capteur n'est pas revenue dans la plage normale de fonctionnement.</p> | <p>Température capteur élevée*</p> <p>Ce message apparaît toutes les 20 minutes lorsque le capteur est trop chaud.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que la température du capteur n'est pas revenue dans la plage normale de fonctionnement.</p> |
| Actions | <p>Déplacez-vous dans un environnement plus chaud pour faire augmenter la température du capteur. Gardez votre Smart Transmetteur allumé, de manière à ce que l'affichage du taux de glucose reprenne dès que la température du capteur est comprise entre 26 °C et 40 °C (81 °F - 104 °F).</p> | <p>Déplacez-vous dans un environnement plus frais pour abaisser la température du capteur. Retirez brièvement le Smart Transmetteur pendant que la température du capteur revient dans la plage comprise entre 26 °C et 40 °C (81 °F - 104 °F). Puis, remettez en marche le Smart Transmetteur pour recevoir de nouveau les valeurs de glucose du capteur.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
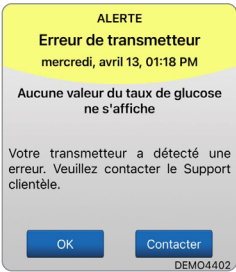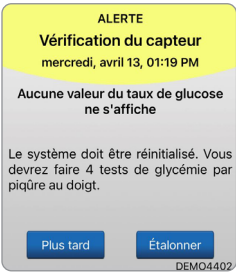
| | | |
|------------------------------|--|---|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Erreur de transmetteur mercredi, avril 13, 01:18 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Votre transmetteur a détecté une erreur. Veuillez contacter le Support clientèle.</p> <p>OK Contacter</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Vérification du capteur mercredi, avril 13, 01:19 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Le système doit être réinitialisé. Vous devrez faire 4 tests de glycémie par piqûre au doigt.</p> <p>Plus tard Étalonner</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Erreur Smart Transmetteur*</p> <p>Apparaît lorsque les contrôles internes du système détectent une erreur du Smart Transmetteur.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que l'erreur n'est pas corrigée.</p> | <p>Vérification du capteur</p> <p>Ce message apparaît lorsque les vérifications internes du système détectent une instabilité du capteur, laquelle nécessite un retour à la phase d'initialisation de l'étalonnage.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne s'affichera avant d'avoir réussi à entrer deux étalonnages.</p> |
| Actions | <p>Suivez les étapes décrites ci-dessous dans la section Dépannage pour réinitialiser votre Smart Transmetteur. Si vous ne parvenez pas à réinitialiser votre appareil, contactez le Support clientèle.</p> | <p>En phase d'initialisation, vous devez faire 4 tests d'étalonnage par piqûre au doigt, espacés de 2 à 12 heures les uns des autres. L'affichage du taux de glucose reprend son cours après le second étalonnage par piqûre au doigt réussi.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
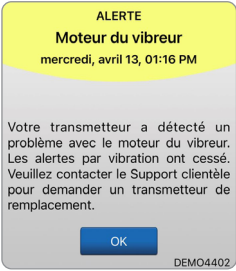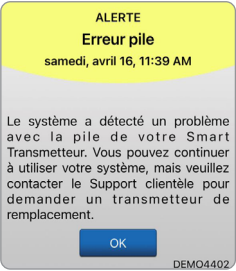
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Moteur du vibreur mercredi, avril 13, 01:16 PM</p> <p>Votre transmetteur a détecté un problème avec le moteur du vibreur. Les alertes par vibration ont cessé. Veuillez contacter le Support clientèle pour demander un transmetteur de remplacement.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>ALERTE Erreur pile samedi, avril 16, 11:39 AM</p> <p>Le système a détecté un problème avec la pile de votre Smart Transmetteur. Vous pouvez continuer à utiliser votre système, mais veuillez contacter le Support clientèle pour demander un transmetteur de remplacement.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Moteur du vibreur*</p> <p>Apparaît toutes les 60 minutes lorsque le moteur du vibreur sur votre Smart Transmetteur ne peut plus fournir d'alerte par vibration sur le corps. Les valeurs du taux de glucose continueront à s'afficher pendant un maximum de 72 heures après réception de ce message d'alerte. Après 72 heures, vous recevrez une alerte Erreur de transmetteur toutes les 20 minutes jusqu'à ce que vous remplaciez le Smart Transmetteur.</p> | <p>Erreur pile*</p> <p>Apparaît lorsque les contrôles internes du système détectent une erreur avec la pile du Smart Transmetteur. Les valeurs du taux de glucose continueront à apparaître, mais votre Smart Transmetteur devra être remplacé.</p> |
| Actions | <p>Contactez le Support clientèle pour demander un Smart Transmetteur de rechange au plus vite.</p> | <p>Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
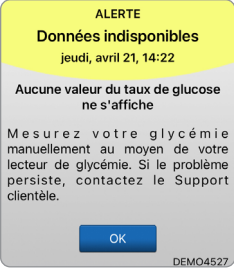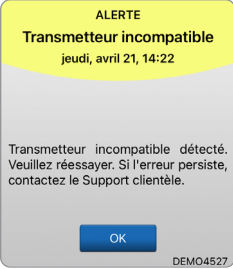
| | | |
|------------------------------|--|---|
| Affichage dans l'application |  |  |
| Description | <p>Données indisponibles Apparaît lorsque les contrôles internes du système détectent une erreur du système.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que l'erreur n'est pas corrigée.</p> | <p>Transmetteur incompatible détecté* Apparaît pendant la liaison lorsque le système détecte que le transmetteur est incompatible avec le capteur.</p> |
| Actions | <p>Branchez le chargeur avec le câble dans une prise murale ou un port USB. Placez le Smart Transmetteur dans le chargeur et retirez-le. Si les conditions persistent, suivez les étapes décrites ci-dessous dans la section <i>Dépannage</i> pour réinitialiser votre Smart Transmetteur. Si vous ne parvenez pas à réinitialiser votre appareil, contactez le Support clientèle.</p> | <p>Essayez à nouveau de réaliser la liaison. Si l'erreur apparaît à la deuxième tentative, contactez le support clientèle.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
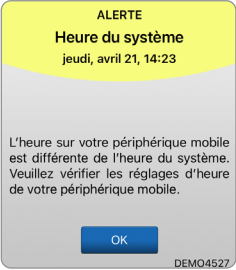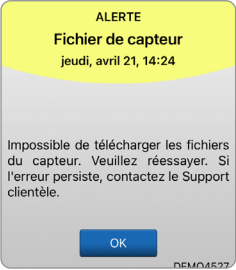
| | | |
|------------------------------|--|---|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Heure du système jeudi, avril 21, 14:23</p> <p>L'heure sur votre périphérique mobile est différente de l'heure du système. Veuillez vérifier les réglages d'heure de votre périphérique mobile.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4527</p> |  <p>ALERTE Fichier de capteur jeudi, avril 21, 14:24</p> <p>Impossible de télécharger les fichiers du capteur. Veuillez réessayer. Si l'erreur persiste, contactez le Support clientèle.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4527</p> |
| Description | <p>Erreur Heure du système</p> <p>Apparaît lorsque le système détecte des heures différentes entre l'horloge de votre appareil mobile et l'horloge du système.</p> | <p>Erreur de fichier de capteur*</p> <p>Apparaît lorsque le système détecte un problème pendant la liaison.</p> |
| Actions | <p>Réglez l'horloge de votre appareil mobile à l'heure locale actuelle. Si le problème persiste, contactez le Support clientèle.</p> | <p>Essayez à nouveau de réaliser la liaison. Si l'erreur apparaît à la deuxième tentative, contactez le support clientèle.</p> |


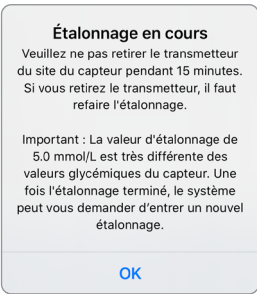
Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
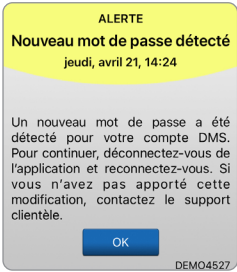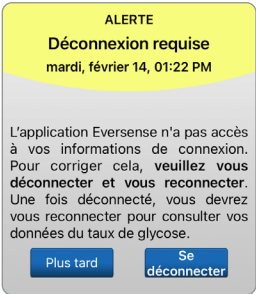
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Nouveau mot de passe détecté jeudi, avril 21, 14:24</p> <p>Un nouveau mot de passe a été détecté pour votre compte DMS. Pour continuer, déconnectez-vous de l'application et reconnectez-vous. Si vous n'avez pas apporté cette modification, contactez le support clientèle.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4527</p> |  <p>ALERTE Déconnexion requise mardi, février 14, 01:22 PM</p> <p>L'application Eversense n'a pas accès à vos informations de connexion. Pour corriger cela, veuillez vous déconnecter et vous reconnecter. Une fois déconnecté, vous devrez vous reconnecter pour consulter vos données du taux de glycose.</p> <p>Plus tard Se déconnecter</p> |
| Description | <p>Nouveau mot de passe détecté Apparaît lorsque le système détecte que le mot de passe a été modifié via votre compte du DMS Eversense.</p> | <p>Déconnexion requise Apparaît toutes les 24 heures pour les utilisateurs d'iOS lorsque le système détecte que vos identifiants Eversense ne sont pas disponibles via la fonction de trousseau d'iOS.</p> |
| Actions | <p>Déconnectez-vous de l'application mobile et reconnectez-vous avec le nouveau mot de passe.</p> | <p>Déconnectez-vous de l'application mobile et reconnectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe existants.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>ALERTE Performances de l'application lundi, avril 24, 04:04 PM</p> <p>Pour vous assurer de recevoir les données et les alertes Eversense sans délai, vous devez désactiver l'optimisation de la batterie pour l'application Eversense dans les paramètres de votre appareil mobile.</p> <p>Plus tard Paramètres</p> <p>61877</p> |  <p>Étalonnage en cours</p> <p>Veillez ne pas retirer le transmetteur du site du capteur pendant 15 minutes. Si vous retirez le transmetteur, il faut refaire l'étalonnage.</p> <p>Important : La valeur d'étalonnage de 5.0 mmol/L est très différente des valeurs glycémiques du capteur. Une fois l'étalonnage terminé, le système peut vous demander d'entrer un nouvel étalonnage.</p> <p>OK</p> |
| Description | <p>Performances de l'application*</p> <p>Apparaît tous les jours sur les systèmes d'exploitation Android lorsque le système détecte des blocages ou interruptions fréquentes de l'application en communication Bluetooth, en raison de l'inclusion de l'application Eversense dans les paramètres d'optimisation de la batterie.</p> | <p>Étalonnage en cours</p> <p>Ce message apparaît lorsque votre valeur d'étalonnage est significativement différente de la valeur du taux de glucose indiquée par votre capteur.</p> |
| Actions | <p>Accédez aux paramètres d'optimisation de la batterie de votre téléphone et désactivez-les pour l'application Eversense afin de vous assurer de recevoir les alertes Eversense sans délai.</p> | <p>Ne retirez pas votre transmetteur pendant 15 minutes.</p> <p>Ré-étalonnez votre système lorsque vous êtes invité(e) à le faire.</p> |


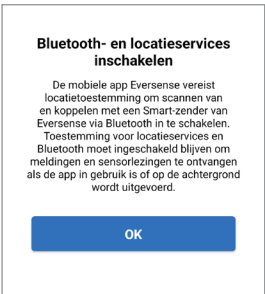
Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
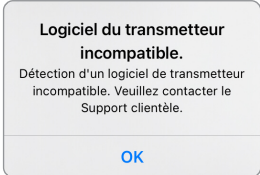
| | | |
|------------------------------|---|---|
| Affichage dans l'application |  |  |
| Description | <p>Logiciel du transmetteur incompatible. Apparaît lorsque le logiciel dans votre Smart Transmetteur est incompatible avec la version de l'application mobile MGC Eversense sur votre appareil mobile.</p> | <p>Avertissement de déconnexion Apparaît lorsque vous tentez de vous déconnecter de l'application mobile. Si vous vous déconnectez, vous ne pourrez pas afficher de données de taux de glucose dans l'application mobile Eversense.</p> |
| Actions | <p>Contactez le Support clientèle.</p> | <p>Restez connecté à l'application mobile pour continuer à afficher vos données de taux de glucose. Si vous vous déconnectez, vous devez vous reconnecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour continuer à utiliser l'application.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  |  |
| Description | <p>Appareil/système d'exploitation incompatible Ce message apparaît lorsqu'un appareil/ système d'exploitation incompatible est utilisé avec l'application.</p> | <p>Activer les services Bluetooth et de localisation Pour Android uniquement. Explique que l'utilisation des services de localisation est nécessaire pour activer la connexion Bluetooth et recevoir des alertes.</p> |
| Actions | <p>Vous trouverez la liste des appareils et des systèmes d'exploitation compatibles sur le site https://global.eversensediatetes.com.</p> | <p>Touchez OK pour acquiescer.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
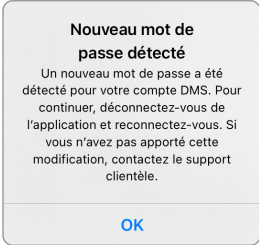
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>Nouveau mot de passe détecté</p> <p>Un nouveau mot de passe a été détecté pour votre compte DMS. Pour continuer, déconnectez-vous de l'application et reconnectez-vous. Si vous n'avez pas apporté cette modification, contactez le support clientèle.</p> <p>OK</p> |  <p>Mot de passe incorrect</p> <p>Vous avez entré un mot de passe incorrect 1 fois. Il vous reste 2 essais avant que votre compte soit bloqué provisoirement.</p> <p>OK</p> |
| Description | Nouveau mot de passe détecté Apparaît lorsque le système détecte que le mot de passe a été modifié via votre compte du DMS Eversense. | Mot de passe incorrect Apparaît lorsque le système détecte qu'un ou deux mots de passe incorrects ont été entrés consécutivement via votre application mobile. |
| Actions | Déconnectez-vous de l'application mobile et reconnectez-vous avec le nouveau mot de passe. | Utilisez le bon mot de passe pour vous connecter à l'application mobile. |



Description des alertes et actions requises (suite)

Alertes
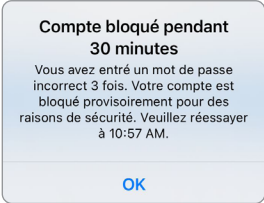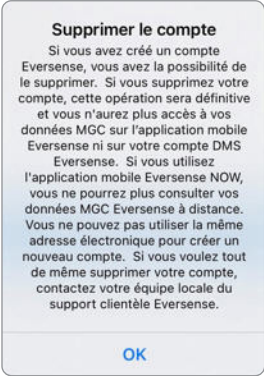
| | | |
|------------------------------|---|--|
| Affichage dans l'application |  <p>Compte bloqué pendant 30 minutes</p> <p>Vous avez entré un mot de passe incorrect 3 fois. Votre compte est bloqué provisoirement pour des raisons de sécurité. Veuillez réessayer à 10:57 AM.</p> <p>OK</p> |  <p>Supprimer le compte</p> <p>Si vous avez créé un compte Eversense, vous avez la possibilité de le supprimer. Si vous supprimez votre compte, cette opération sera définitive et vous n'aurez plus accès à vos données MGC sur l'application mobile Eversense ni sur votre compte DMS Eversense. Si vous utilisez l'application mobile Eversense NOW, vous ne pourrez plus consulter vos données MGC Eversense à distance. Vous ne pouvez pas utiliser la même adresse électronique pour créer un nouveau compte. Si vous voulez tout de même supprimer votre compte, contactez votre équipe locale du support clientèle Eversense.</p> <p>OK</p> |
| Description | Compte bloqué Apparaît après avoir entré trois mots de passe incorrects consécutifs via votre application mobile. | Supprimer le compte Apparaît lorsque vous touchez Supprimer le compte sur la page de connexion. |
| Actions | Attendez environ 30 minutes. Connectez-vous avec le bon mot de passe ou réinitialisez votre mot de passe. | Contactez le support clientèle si vous voulez poursuivre. |



Description des alertes et actions requises (suite)

Notifications
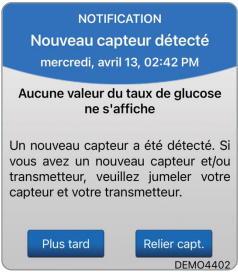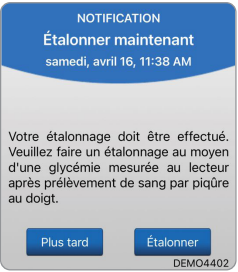
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>NOTIFICATION Nouveau capteur détecté mercredi, avril 13, 02:42 PM</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche</p> <p>Un nouveau capteur a été détecté. Si vous avez un nouveau capteur et/ou transmetteur, veuillez jumeler votre capteur et votre transmetteur.</p> <p>Plus tard Relier capt.</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>NOTIFICATION Étalonner maintenant samedi, avril 16, 11:38 AM</p> <p>Votre étalonnage doit être effectué. Veuillez faire un étalonnage au moyen d'une glycémie mesurée au lecteur après prélèvement de sang par piqûre au doigt.</p> <p>Plus tard Étalonner</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Nouveau capteur détecté</p> <p>Ce message apparaît lorsque le Smart Transmetteur détecte un nouveau capteur. Le capteur inséré et le Smart Transmetteur doivent être jumelés pour pouvoir communiquer ensemble.</p> | <p>Étalonner maintenant</p> <p>Ce message apparaît lorsque vous devez réaliser un étalonnage lorsque le système est en phase d'initialisation ou après avoir entré un étalonnage très différent du taux de glucose capteur.</p> |
| Actions | <p>Touchez Relier capt. pour terminer le processus de liaison et commencer la phase d'acclimatation de 24 heures. Vous n'avez pas besoin de porter votre Smart Transmetteur au-dessus du capteur tant que la phase d'acclimatation n'est pas terminée.</p> | <p>Faites un test de glycémie par piqûre au doigt et entrez la valeur obtenue comme valeur d'étalonnage. N'UTILISEZ PAS une gouttelette de sang provenant d'un autre site (comme l'avant-bras) pour mesurer la glycémie avec le lecteur.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Notifications
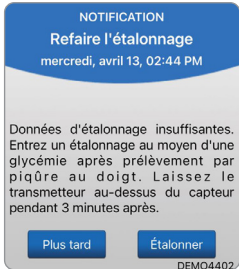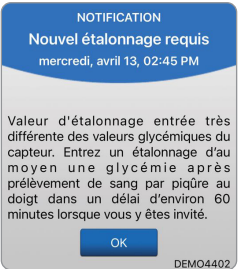
| | | |
|------------------------------|--|--|
| Affichage dans l'application |  <p>NOTIFICATION Refaire l'étalonnage mercredi, avril 13, 02:44 PM</p> <p>Données d'étalonnage insuffisantes. Entrez un étalonnage au moyen d'une glycémie après prélèvement par piqûre au doigt. Laissez le transmetteur au-dessus du capteur pendant 3 minutes après.</p> <p><input type="button" value="Plus tard"/> <input type="button" value="Étalonner"/></p> <p>DEMO4402</p> |  <p>NOTIFICATION Nouvel étalonnage requis mercredi, avril 13, 02:45 PM</p> <p>Valeur d'étalonnage entrée très différente des valeurs glycémiques du capteur. Entrez un étalonnage d'au moyen une glycémie après prélèvement de sang par piqûre au doigt dans un délai d'environ 60 minutes lorsque vous y êtes invité.</p> <p><input type="button" value="OK"/></p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Refaire l'étalonnage Apparaît si les données recueillies pendant l'étalonnage sont insuffisantes.</p> | <p>Nouvel étalonnage requis Ce message apparaît si la valeur d'étalonnage entrée est significativement différente de la valeur du taux de glucose capteur. Après environ 1 heure, vous recevrez une notification Étalonner maintenant.</p> |
| Actions | <p>Touchez Étalonner pour entrer une nouvelle valeur d'étalonnage.</p> | <p>Entrez une nouvelle valeur d'étalonnage lorsque vous y êtes invité.</p> |



Description des alertes et actions requises (suite)

Notifications
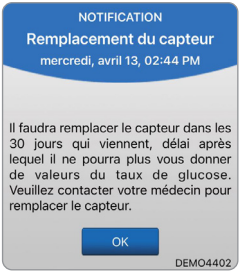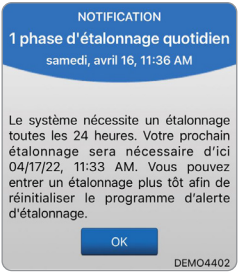
| | | |
|------------------------------|---|---|
| Affichage dans l'application |  <p>NOTIFICATION Remplacement du capteur mercredi, avril 13, 02:44 PM</p> <p>Il faudra remplacer le capteur dans les 30 jours qui viennent, délai après lequel il ne pourra plus vous donner de valeurs du taux de glucose. Veuillez contacter votre médecin pour remplacer le capteur.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>NOTIFICATION 1 phase d'étalonnage quotidien samedi, avril 16, 11:36 AM</p> <p>Le système nécessite un étalonnage toutes les 24 heures. Votre prochain étalonnage sera nécessaire d'ici 04/17/22, 11:33 AM. Vous pouvez entrer un étalonnage plus tôt afin de réinitialiser le programme d'alerte d'étalonnage.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | <p>Remplacement du capteur Ce message apparaît 60, 30, 14, 7, 3 et 1 jour(s) avant que votre capteur soit arrivé au bout de sa durée de vie.</p> | <p>1 étalonnage quotidien Apparaît lorsque le système exige un étalonnage toutes les 24 heures.</p> |
| Actions | <p>Prenez rendez-vous avec votre médecin ou professionnel de santé pour retirer et remplacer votre capteur.</p> | <p>Entrez une nouvelle valeur d'étalonnage lorsque vous y êtes invité.</p> |

Description des alertes et actions requises (suite)

Notifications
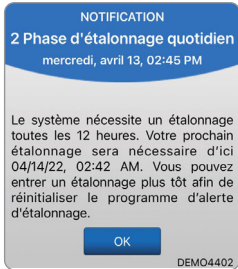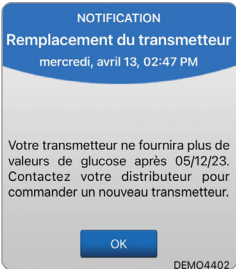
| | | |
|------------------------------|---|--|
| Affichage dans l'application |  <p>NOTIFICATION 2 Phase d'étalonnage quotidien mercredi, avril 13, 02:45 PM</p> <p>Le système nécessite un étalonnage toutes les 12 heures. Votre prochain étalonnage sera nécessaire d'ici 04/14/22, 02:42 AM. Vous pouvez entrer un étalonnage plus tôt afin de réinitialiser le programme d'alerte d'étalonnage.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |  <p>NOTIFICATION Remplacement du transmetteur mercredi, avril 13, 02:47 PM</p> <p>Votre transmetteur ne fournira plus de valeurs de glucose après 05/12/23. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> <p>OK</p> <p>DEMO4402</p> |
| Description | 2 étalonnages quotidiens Apparaît lorsque le système exige deux étalonnages par jour. | Fin de vie du transmetteur Jour 330 Apparaît une fois 35 jours avant l'expiration de la garantie de votre transmetteur. |
| Actions | Entrez une nouvelle valeur d'étalonnage lorsque vous y êtes invité. | Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur. |

10. Journal des événements

Cette section décrit comment passer en revue et consigner des événements dans le journal pour suivre les cycles de variation du taux de glucose.

Le système MGC Eversense E3 vous permet d'inscrire dans le journal et de suivre des événements, en plus de sa fonction de surveillance continue du taux de glucose. Vous pouvez entrer des événements manuellement, lesquels apparaîtront sur le graphe de tendance et dans les rapports de glucose pour faire apparaître des cycles de variation dans votre profil de glycémie.

Types d'événements :



Glucose



Repas



Insuline



Santé



Exercice

Remarque : vous pouvez également accéder directement à l'écran **AJOUTER UN ÉVÉNEMENT** depuis l'écran **MON GLUCOSE** en touchant une fois la zone graphique.

Afficher les événements

Vous pouvez consulter les événements passés sur l'écran **JOURNAL**

DES ÉVÉNEMENTS.


1. Touchez **Menu** > **Journal des événements**.

L'écran **JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS** apparaît.

2. Tous les événements que vous avez entrés sont listés.

Vous pouvez aussi sélectionner des types d'événements spécifiques à afficher en tapant sur un type d'événement qui vous intéresse.

- Touchez **TOUS**, puis touchez les icônes en haut de l'écran pour sélectionner uniquement les types d'événements que vous voulez afficher.

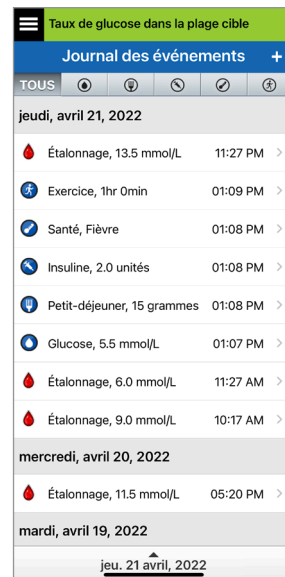

| Taux de glucose dans la plage cible | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Journal des événements + | | |
| TOUS | 🕒 | 🕒 |
| jeudi, avril 21, 2022 | | |
| 🔴 | Étalonnage, 13.5 mmol/L | 11:27 PM > |
| 🏃 | Exercice, 1hr 0min | 01:09 PM > |
| 👤 | Santé, Fièvre | 01:08 PM > |
| 💉 | Insuline, 2.0 unités | 01:08 PM > |
| 🍽 | Petit-déjeuner, 15 grammes | 01:08 PM > |
| 🔵 | Glucose, 5.5 mmol/L | 01:07 PM > |
| 🔴 | Étalonnage, 6.0 mmol/L | 11:27 AM > |
| 🔴 | Étalonnage, 9.0 mmol/L | 10:17 AM > |
| mercredi, avril 20, 2022 | | |
| 🔴 | Étalonnage, 11.5 mmol/L | 05:20 PM > |
| mardi, avril 19, 2022 | | |
| jeu. 21 avril, 2022 | | |

Consigner des événements spécifiques





Glucose

Entrez et suivez des testes de mesure de la glycémie (résultats de tests autre que les étalonnages).

1. Touchez **Menu** > **Journal des événements**.
2. Ajoutez un événement à l'aide de l'icône d'événement « **+** » > **Glucose**.
3. Touchez **Heure** pour entrer la date et l'heure.
Touchez **Terminé**.
4. Touchez **Glucose** pour entrer la valeur de taux de glucose. Touchez **Terminé**.


Remarque : vous pouvez entrer une valeur de glycémie comprise entre 1,1 et 33,3 mmol/l. Les entrées < 1,1 mmol/l seront ramenées à 1,1 et les entrées supérieures à 33,3 mmol/l seront ramenées à 33,3 à des fins de calcul et d'affichage.

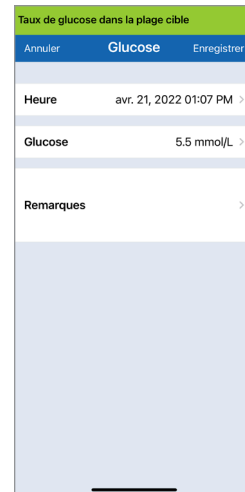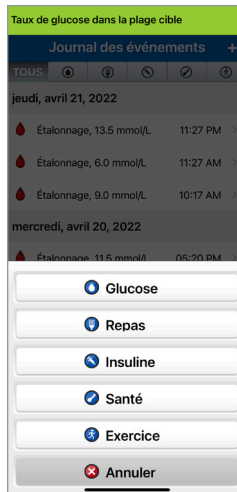


5. Touchez **Enregistrer**.

6. Dans la fenêtre contextuelle **Confirmer le taux de glucose**, touchez **Soumettre** pour confirmer l'événement de glycémie et retourner à l'écran **JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS**, ou touchez **Annuler** pour quitter sans enregistrer les modifications ou pour éditer les informations avant de sauvegarder.

Remarque : les événements de glycémie ne remplacent pas les mesures d'étalonnage. Vous aurez toujours à entrer les valeurs d'étalonnage.

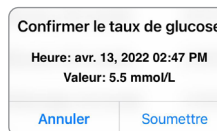

iOS

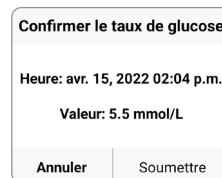

Android



Repas

Entrez le type de repas, sa date, son heure et la quantité de glucides absorbée.

1. Touchez **Menu** > **Journal des événements**.
2. Ajoutez un événement à l'aide de l'icône d'événement « **+** » > **Repas**.
3. Touchez **Heure** pour entrer la date et l'heure.
Touchez **Terminé**.
4. Touchez **Type** pour entrer le type de repas.
Touchez **Terminé**.
5. Touchez **Glucides** pour entrer la quantité de glucides.
Touchez **Terminé**.
6. Touchez **Remarques** pour entrer des remarques.
Touchez **Terminé**.
7. Touchez **Sauvegarder** pour enregistrer une entrée et retourner à l'écran **JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS**. Touchez **Annuler** pour quitter sans enregistrer les modifications.

| Taux de glucose dans la plage cible | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Annuler | Repas | Enregistrer |
| Heure | avr. 21, 2022 01:08 PM | > |
| Type | Petit-déjeuner | > |
| Glucides | 15 grammes | > |
| Remarques | | > |



Insuline

Entrez le nombre d'unités d'insuline selon l'heure et le type d'insuline.

1. Touchez **Menu** > **Journal des événements**.
2. Ajoutez un événement à l'aide de l'icône d'événement « **+** » > **Insuline**.
3. Touchez **Heure** pour entrer la date et l'heure.
Touchez **Terminé**.
4. Touchez **Unités** pour entrer le nombre d'unités.
Touchez **Terminé**.
Remarque : le nombre maximum d'unités d'insuline pouvant être entré est 200U.
5. Touchez **Type** pour entrer le type d'insuline.
Touchez **Terminé**.
6. Touchez **Remarques** pour entrer des remarques.
Touchez **Terminé**.
7. Touchez **Sauvegarder** pour enregistrer une entrée et retourner à l'écran **JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS**. Touchez **Annuler** pour quitter sans enregistrer les modifications.

| Taux de glucose dans la plage cible | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Annuler | Insuline | Enregistrer |
| Heure | avr. 21, 2022 01:08 PM | > |
| Unités | 2.0 | > |
| Type | À action rapide | > |
| Remarques | | > |



Santé

Entrez le type de problème médical, sa gravité, la date et l'heure.

1. Touchez **Menu** > **Journal des événements**.
2. Ajoutez un événement à l'aide de l'icône d'événement « **+** » > **Santé**.
3. Touchez **Heure** pour entrer la date et l'heure.
Touchez **Terminé**.
4. Touchez **Gravité** pour entrer Faible, Moyenne ou Élevée.
Touchez **Terminé**.
5. Touchez **État** pour entrer l'état de santé.
Touchez **Terminé**.
6. Touchez **Remarques** pour entrer des remarques.
Touchez **Terminé**.
7. Touchez **Sauvegarder** pour enregistrer une entrée et retourner à l'écran **JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS**. Touchez **Annuler** pour quitter sans enregistrer les modifications.

| Taux de glucose dans la plage cible | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Annuler | Santé | Enregistrer |
| Heure | avr. 21, 2022 01:08 PM | > |
| Gravité | Moyen | > |
| État | Fièvre | > |
| Remarques | | > |



Exercice

Entrez le type d'exercice, sa durée et son intensité

1. Touchez **Menu** > **Journal des événements**.
2. Ajoutez un événement à l'aide de l'icône d'événement « **+** » > **Exercice**.
3. Touchez **Heure** pour entrer la date et l'heure.
Touchez **Terminé**.
4. Touchez **Intensité** pour entrer Faible, Moyenne ou Élevée.
Touchez **Terminé**.
5. Touchez **Durée** pour entrer la durée.
Touchez **Terminé**.
6. Touchez **Remarques** pour entrer des remarques.
Touchez **Terminé**.
7. Touchez **Sauvegarder** pour enregistrer une entrée et retourner à l'écran **JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS**. Touchez **Annuler** pour quitter sans enregistrer les modifications.

| Taux de glucose dans la plage cible | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Annuler | Exercice | Enregistrer |
| Heure | avr. 21, 2022 01:09 PM | > |
| Intensité | Moyen | > |
| Durée | 1h 0min | > |
| Remarques | | > |

II. Rapports

Cette section décrit les différents rapports de glucose accessibles pour résumer votre profil de glucose. Vous pouvez choisir des dates spécifiques ou sélectionner des plages d'heures prédéfinies.

Types de rapports

- Récap modal hebdo
- Diagramme circulaire de glucose
- Statistiques du taux de glucose

Remarque : réglez bien la date et l'heure de votre appareil mobile. La précision des graphiques et des rapports dépend de leur exactitude.

Pour afficher les rapports de glucose, touchez **Menu** > **Rapports** et balayez pour vous déplacer parmi les trois rapports. Vous pouvez envoyer par e-mail chacun des rapports en tapant sur l'icône d'e-mail dans le coin en haut à droite.

Récap modal hebdo

Le rapport montre les 7 derniers jours de relevés du taux de glucose, résumés sur un graphique linéaire de 24 heures pour faire apparaître des cycles de variation sur une journée.

- La **ligne bleue** est la moyenne des sept derniers jours de vos relevés par période d'une heure.
- Les **barres rouges** indiquent les relevés réels le plus haut et le plus bas sur la même période d'une heure.
- Les **lignes pointillées horizontales rouges** sont vos niveaux d'alerte d'hypoglycémie et d'hyperglycémie prédéfinis.
- Les **lignes pointillées horizontales vertes** sont vos niveaux cibles d'hypoglycémie et d'hyperglycémie prédéfinis.

Ce rapport fournit aussi des statistiques récapitulatives (moyenne, écart type des séries de valeurs), la performance cible du glucose (pourcentage dans la plage, au-dessus ou en-dessous de la plage cible pour le glucose) et les valeurs du taux de glucose qui montrent une hyperglycémie ou une hypoglycémie (pourcentage des valeurs qui tombent dans la plage hyperglycémie et hypoglycémie). Les informations sont présentées sur des plages de 6 heures.



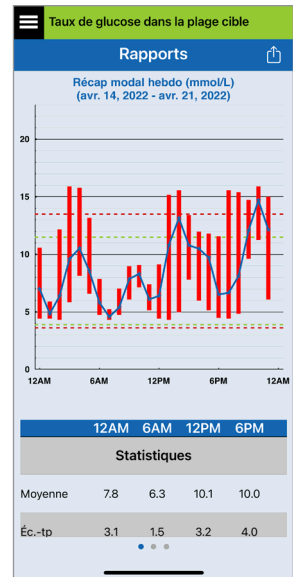


Diagramme circulaire de glucose

Ce rapport montre sous forme graphique quel pourcentage des valeurs durant une plage de temps donnée est en-dessous, au-dessus ou dans la plage cible du glucose. Vous pouvez choisir les 1, 7, 14, 30 ou 90 derniers jours.

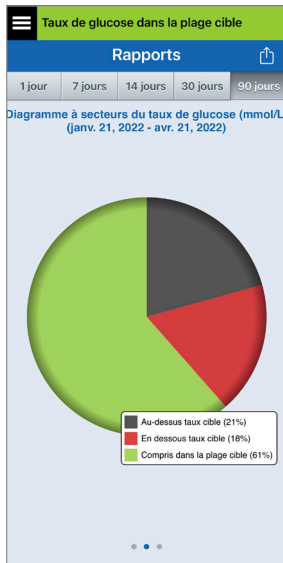


iOS

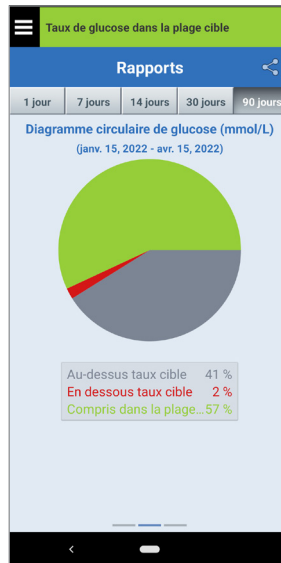

Android

Statistiques du taux de glucose

Ce rapport montre votre moyenne, les valeurs minimum et maximum du taux de glucose, ainsi que l'écart type sur des plages de 6 heures. Vous pouvez choisir les 1, 7, 14, 30 ou 90 derniers jours.

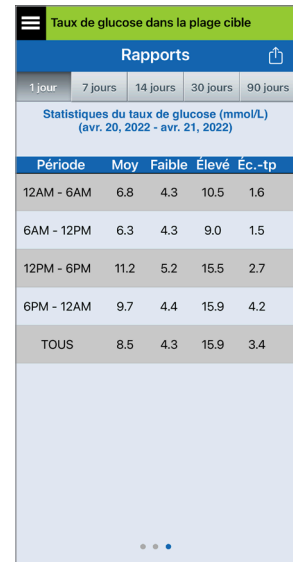

12. Partage de données

Il existe plusieurs manières de partager les données avec Eversense.

Programme de gestion des données Eversense DMS (Data Management Software)

Le programme DMS Eversense est une application Web permettant aux patients, soignants et professionnels de santé de visualiser et d'analyser les données du glucose qui ont été transmises par le Smart Transmetteur Eversense E3 ou par l'application mobile du système MGC Eversense.

Le programme est gratuit pour les utilisateurs du système MGC Eversense E3. Pour en savoir plus sur le programme DMS Eversense, rendez-vous sur la page <https://global.eversensediatetes.com>. Lorsque vous créez et enregistrez votre compte durant l'installation de l'application mobile MGC Eversense, un compte DMS Eversense se crée automatiquement pour vous. La section *Eversense NOW* a plus d'information sur l'accès à vos données de glucose à distance du système MGC Eversense E3.

IMPORTANT : LE SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES EVERSENSE E3 NE FOURNIT AUCUNE INDICATION CLINIQUE. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À VOTRE TRAITEMENT DOIVENT ÊTRE DEMANDÉES PAR VOTRE ÉQUIPE DE SOIGNANTS.

Partager mes données


La fonction Partager mes données de l'application mobile du système MGC Eversense permet de synchroniser manuellement les données avec votre compte DMS Eversense, d'inviter des amis et parents à consulter vos données MGC à distance via l'application mobile Eversense NOW et de se connecter à d'autres applications de santé compatibles.





Synchroniser

Tant que vous avez une connexion Internet, que la synchronisation automatique est activée et que vous êtes connecté(e) à l'application, les valeurs du taux de glucose se synchronisent dans votre compte DMS Eversense toutes les 5 minutes environ. Vous pouvez désactiver la synchronisation automatique.

Pour désactiver la synchronisation automatique, touchez **Synchroniser** sur l'écran **PARTAGER MES DONNÉES**. Touchez le bouton **Synchronisation automatique** pour la désactiver.

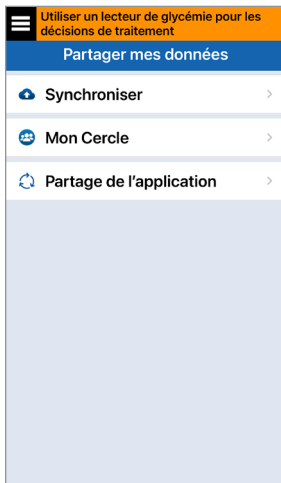

Pour synchroniser vos données manuellement, touchez le bouton **LANCER LA SYNCHRONISATION**. Les données correspondant au nombre de jours sélectionné par défaut se synchronisent. Vous pouvez configurer le nombre de jours de synchro par défaut sur 1, 3, 7, 14 ou 30 jours.

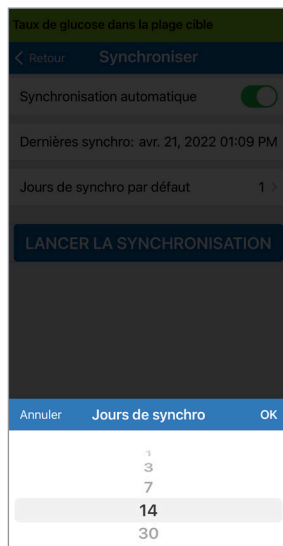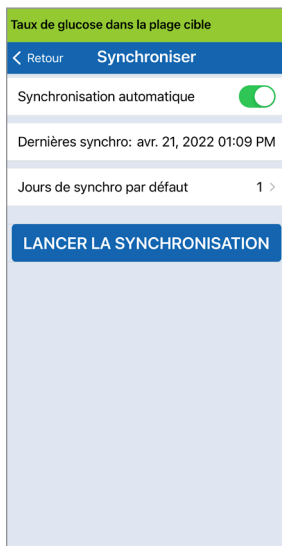


IMPORTANT : si vous désactivez la synchronisation automatique, vos données ne seront plus envoyées à personne via l'application Eversense NOW. Personne ne fera le suivi de votre taux de glucose à distance. En outre, vos données d'historique du taux de glucose arrêteront de se mettre en mémoire dans votre compte DMS.



Mon Cercle




Mon Cercle est une fonction optionnelle qui vous permet d'activer le suivi à distance de vos données MGC E3. Pour plus de détails sur cette fonction, voir *Mon Cercle - Suivi à distance*.

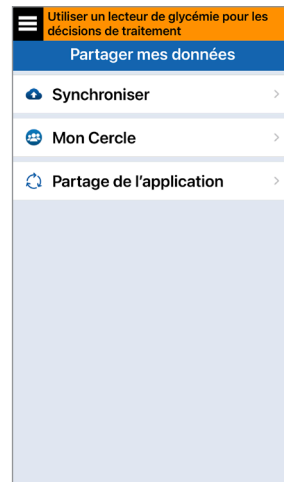



Partage de l'application

La fonction en option Partage de l'application permet de partager certaines données Eversense avec une autre application de santé compatible. Touchez l'application et activez **Partager les données**. Vous devrez peut-être également autoriser le partage via l'application de santé.

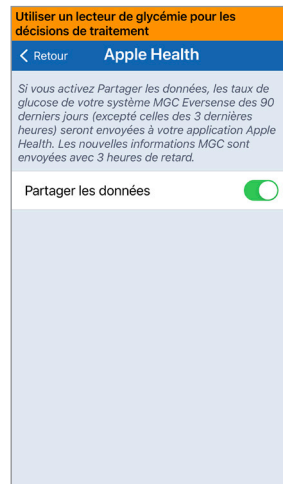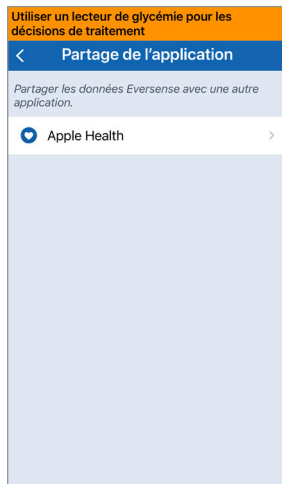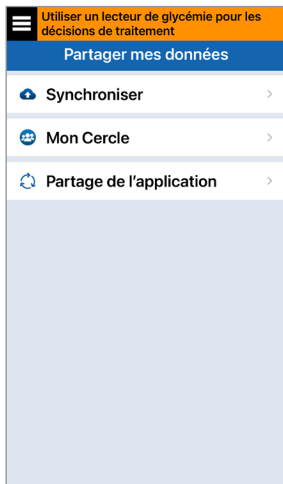

13. Informations produit et informations générales sur l'application


Cette section décrit les informations qui sont disponibles dans la section À propos du menu principal.

Vous pouvez visualiser les informations produit concernant votre Smart Transmetteur, votre capteur et votre application mobile MGC Eversense.

1. Touchez **Menu > À propos** puis touchez **Mon Transmetteur, Mon capteur ou Informations produit.**



Sur l'écran **Mon Transmetteur**, vous trouverez des informations telles que le numéro de série, des informations relatives à l'étalonnage et au niveau de la pile. Vous pouvez aussi regarder une démonstration de la fonction de vibration du Smart Transmetteur.

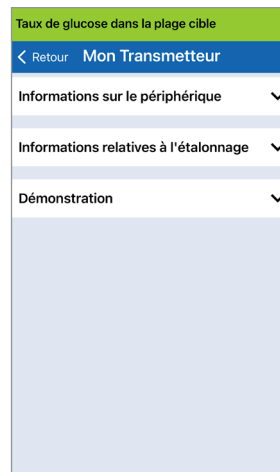

Sur l'écran **Mon capteur**, vous pouvez afficher le numéro de série du capteur et des détails concernant l'insertion.

| Taux de glucose dans la plage cible | |
|-------------------------------------|----------|
| < À propos Mon capteur | |
| NS lié | 7679 |
| Date d'insertion | 04/13/22 |
| Heure d'insertion | 02:21 PM |
| NS détecté | 7679 |

Sur l'écran **Mon compte**, vous pouvez modifier votre photo de profil, consulter l'adresse électronique utilisée pour créer votre compte Eversense et vous déconnecter de l'application Eversense.

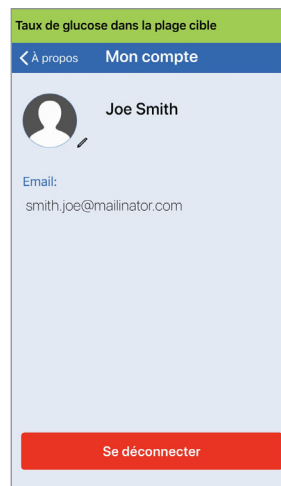


Photo du profil


Vous pouvez mettre à jour la photo du profil dans votre compte Eversense. Cette photo s'affichera dans l'application mobile Eversense et dans votre compte DMS Eversense.

- Accédez à **À propos > Mon compte** et touchez la photo. Vous pouvez également toucher la photo depuis le menu principal.
- Suivez l'invite pour mettre à jour ou modifier l'image. Vous pouvez soit pour prendre une nouvelle photo, soit en choisir une existante.
- La photo que vous sélectionnez s'affiche sur l'écran du **Menu principal**.

Remarque : vous pouvez aussi changer votre photo de profil depuis votre compte DMS Eversense. Pour plus de détails, consultez la section *Eversense DMS*.




Sur l'écran **Informations produit**, vous pouvez consulter des informations sur la version logicielle de l'application mobile et sur Senseonics, Inc., le fabricant du système MGC Eversense E3.

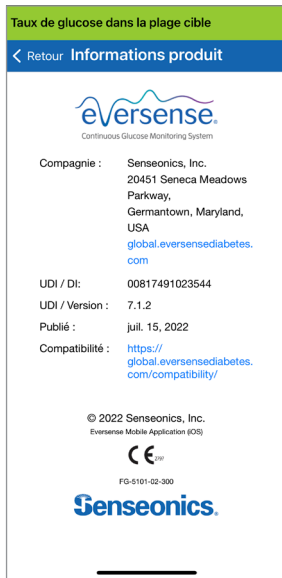

À partir du menu À propos, vous pouvez aussi envoyer vos commentaires ou consulter la licence d'exploitation pour l'utilisateur final et la politique de confidentialité.

- Touchez **Nous contacter** pour nous envoyer un e-mail afin de contacter l'équipe du support clientèle local.

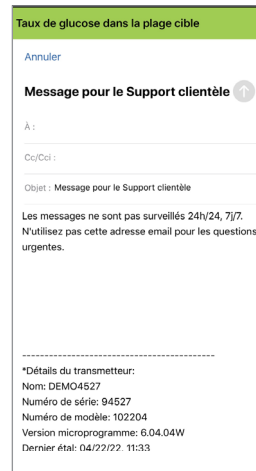

IMPORTANT : ce compte e-mail n'est pas surveillé 24h/24, 7j/7. **N'UTILISEZ PAS** cette adresse pour des questions urgentes ou de santé.


Pour lire la licence d'exploitation pour l'utilisateur final et la politique de confidentialité, tapez l'une ou l'autre option.



Pour trouver votre distributeur local sur notre site Web, touchez **Aide**.

Se déconnecter

Pour vous déconnecter de votre compte Eversense, touchez **Mon compte** > **Se déconnecter**.

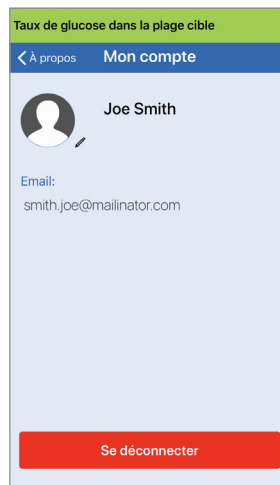

IMPORTANT : si vous vous déconnectez, aucune donnée de glucose n'apparaît sur l'application tant que vous ne vous reconnectez pas avec l'e-mail et le mot de passe que vous avez entrés lorsque vous avez configuré votre compte.

14. Afficher des données Eversense E3 sur une montre Apple Watch


Vous pouvez voir un aperçu de vos données MGC Eversense E3 sur votre Apple Watch. Une fois que vous avez téléchargé et installé l'application mobile MGC Eversense sur votre appareil mobile, suivez les instructions de l'Apple Watch pour ajouter l'application à votre montre.

L'Apple Watch est un affichage secondaire des données MGC Eversense E3. Elle ne remplace en aucun cas l'affichage principal MGC Eversense.


Tout problème survenant sur les appareils mobiles, l'Internet sans fil, la connexion pour transmettre les données ou le système de gestion des données (DMS) Eversense peut entraîner un retard ou un dysfonctionnement de l'affichage des données. Il en est de même si le Smart Transmetteur de l'utilisateur MGC n'est pas à portée de son appareil mobile ou est en cours de charge.

Si vous avez des symptômes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie OU si vos symptômes ne correspondent pas aux valeurs du taux de glucose obtenues par le capteur, testez votre glycémie à l'aide d'un lecteur avant de prendre une décision thérapeutique quelconque.


Pour accéder à des fonctions supplémentaires de l'application, touchez l'icône **Eversense** sur la **page d'accueil** de votre montre pour ouvrir l'application.

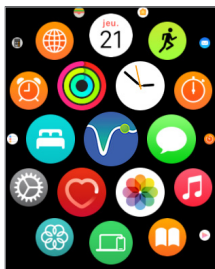


L'écran **Mon glucose** affiche votre taux de glucose actuel avec une flèche de tendance et un graphe de tendance de vos trois dernières heures de données MGC.

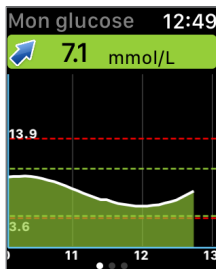

Vous pouvez également accéder à l'écran **MON GLUCOSE** si vous activez les notifications d'Eversense E3 dans les paramètres de votre Apple Watch. Lorsque vous recevez une notification, vous pouvez aussi toucher le message pour afficher à nouveau l'écran **MON GLUCOSE**.

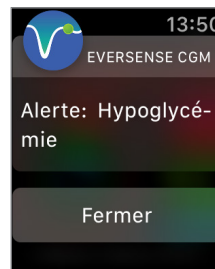


Faites défiler le cadran de la montre vers la gauche pour passer au diagramme à secteurs suivant ou à votre durée totale dans la plage et hors plage cible au cours des 24 dernières heures.

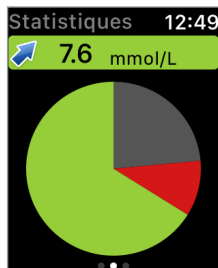

Faites défiler le cadran de la montre vers le haut pour afficher les mêmes données sous forme de pourcentages.



Balayez vers la gauche jusqu'à l'écran suivant avec votre flèches de tendance de glucose actuelle, l'heure de votre prochain étalonnage, la phase d'étalonnage actuelle du système et le niveau de la pile de votre Smart Transmetteur.

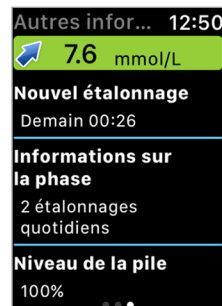



Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch

L'Apple Watch est un affichage secondaire de l'application mobile MGC Eversense. Toute alerte ou notification reçue sur l'Apple Watch devrait être confirmée sur l'application mobile MGC Eversense avant de faire quoi que ce soit.

Si vous ignorez une alerte sur la montre, son affichage disparaît de l'écran de verrouillage du téléphone. Lorsque vous ouvrez l'application mobile, l'alerte apparaît avec toutes les informations.



Le tableau suivant liste les alertes et les notifications que vous pouvez recevoir sur l'Apple Watch depuis l'application Eversense App. Certaines alertes et notifications sont affectées par les paramètres audio de l'application mobile et la fonction Ne pas déranger de l'application mobile. Vous trouverez des informations supplémentaires sous *Régler les tonalités* et *Description des alertes et actions requises*.

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)
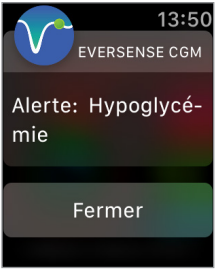
| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Hypoglycémie Apparaît à l'intervalle que vous avez entré dans les paramètres audio lorsque les valeurs du taux de glucose de votre capteur sont en-dessous ou correspondent au niveau d'alerte d'hypoglycémie que vous avez configuré.</p> | <p>Hyperglycémie Apparaît à l'intervalle que vous avez entré dans les paramètres audio lorsque les valeurs du taux de glucose de votre capteur sont au-dessus ou correspondent au niveau d'alerte d'hyperglycémie que vous avez configuré.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si vos symptômes ne correspondent pas à la valeur du taux de glucose capteur, confirmez votre taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si vos symptômes ne correspondent pas à la valeur du taux de glucose capteur, confirmez votre taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes
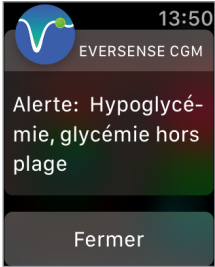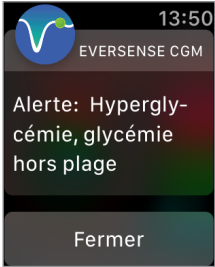
| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Hypoglycémie, glycémie hors plage Apparaît lorsque votre valeur du taux de glucose est inférieure à 2,2 mmol/l.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne peut être affichée.</p> | <p>Hyperglycémie, glycémie hors plage Apparaît lorsque votre valeur du taux de glucose est supérieure à 22,2 mmol/l.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne peut être affichée.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Mesurez votre glycémie manuellement au moyen de votre lecteur de glycémie. Confirmez toujours votre valeur du taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre toute décision thérapeutique. Une fois que la valeur du taux de glucose capteur arrive à ou dépasse 2,2 mmol/l, les valeurs se réaffichent.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Mesurez votre glycémie manuellement au moyen de votre lecteur de glycémie. Confirmez toujours votre valeur du taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre toute décision thérapeutique. Une fois que la valeur du taux de glucose capteur arrive à ou tombe en-dessous de 22,2 mmol/l, les valeurs se réaffichent.</p> |

14



Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Hypo en prévision Ce message apparaît toutes les 60 minutes lorsque les valeurs de votre taux de glucose dévient à la baisse et qu'elles atteignent le niveau d'alerte d'hypoglycémie dans l'intervalle que vous avez configuré dans les paramètres.</p> | <p>Hyper en prévision Ce message apparaît toutes les 60 minutes lorsque les valeurs de votre taux de glucose dévient à la hausse et qu'elles atteignent le niveau d'alerte d'hyperglycémie dans l'intervalle que vous avez configuré dans les paramètres.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si les symptômes ne correspondent pas à la valeur du taux de glucose capteur, confirmez votre taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si les symptômes ne correspondent pas à la valeur du taux de glucose capteur, confirmez votre taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | |
|-----------------------------|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  A screenshot of an Apple Watch notification. At the top, there is a circular icon with a white 'V' on a blue background, followed by the text 'EVERSENSE CGM' and the time '14:03'. The main text of the notification reads 'Alerte: Augmentation du taux de glucose'. At the bottom, there is a grey button labeled 'Fermer'. |
| Description | <p>Augmentation du taux de glucose Ce message apparaît toutes les 60 minutes lorsque les valeurs de votre taux de glucose s'élèvent à une vitesse supérieure ou égale au taux de variation que vous avez entré dans les paramètres.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Faites bien attention aux valeurs de votre taux de glucose. Si les symptômes ne correspondent pas à la valeur du taux de glucose capteur, confirmez votre taux de glucose avec un lecteur de glycémie avant de prendre une décision thérapeutique.</p> |
| |  A screenshot of an Apple Watch notification. At the top, there is a circular icon with a white 'V' on a blue background, followed by the text 'EVERSENSE CGM' and the time '14:03'. The main text of the notification reads 'Alerte: Chute du taux de glucose'. At the bottom, there is a grey button labeled 'Fermer'. |
| | <p>Chute du taux de glucose Ce message apparaît toutes les 60 minutes lorsque les valeurs de votre taux de glucose chutent à une vitesse supérieure ou égale au taux de variation que vous avez entré dans les paramètres.</p> |

14

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Aucun capteur détecté Apparaît quand la connexion est perdue entre votre capteur et le transmetteur. Aucun taux de glucose n'est disponible tant que la connexion n'est pas rétablie.</p> | <p>Remplacement du capteur Apparaît une fois que les autotests du système ont détecté que le capteur ne peut plus fournir de valeur de taux de glucose.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Utilisez le Guide de placement pour vous aider à mettre en place le Smart Transmetteur au-dessus du capteur jusqu'à ce qu'il signale une connexion.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Prenez rendez-vous avec votre médecin ou professionnel de santé pour remplacer votre capteur.</p> |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)


Alertes

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Remplacement du capteur Apparaît une fois que la durée de vie du capteur est écoulée.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne s'affichera tant que vous n'aurez pas remplacé le capteur.</p> | <p>Charger le transmetteur Ce message apparaît lorsque le niveau de charge de la pile du Smart Transmetteur est très faible et qu'il faut la recharger très prochainement.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Prenez rendez-vous avec votre médecin ou professionnel de santé pour remplacer votre capteur.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Chargez votre Smart Transmetteur dès que possible.</p> |

14



Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Pile à plat Apparaît lorsque la pile de votre Smart Transmetteur est à plat et doit être rechargée.</p> <p>Aucune valeur du taux de glucose ne s'affichera tant que le Smart Transmetteur n'aura pas été rechargé.</p> | <p>Étalonner maintenant Indique que votre étalonnage doit être effectué. Sans étalonnage dans les 4 heures, les valeurs de taux de glucose n'apparaîtront plus.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Chargez immédiatement le Smart Transmetteur. Retirez le transmetteur de votre corps avant de le connecter à une source d'alimentation.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Touchez Étalonner sur votre appareil mobile pour entrer une valeur d'étalonnage.</p> |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes
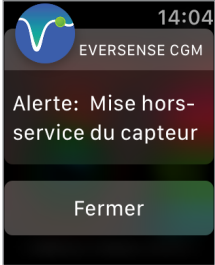
| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Mise hors-service du capteur Ce message apparaît lorsque les vérifications internes du système détectent qu'il faut refaire la phase d'initialisation pour faire des étalonnages supplémentaires. Les valeurs du glucose s'affichent quelques minutes après le second étalonnage qui a réussi durant la phase d'initialisation.</p> | <p>Étalonnage en retard Apparaît lorsque l'étalonnage de votre système est en retard. Aucune valeur de taux de glucose ne peut être affichée avant d'avoir entré un étalonnage dans l'application mobile MGC Eversense.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. La réinitialisation du système commence 6 heures plus tard.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Faites un étalonnage par piqûre au doigt pour pouvoir reprendre l'affichage des valeurs du taux de glucose.</p> |

14



Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Étalonnage expiré Apparaît lorsque votre dernier étalonnage remonte à plus de 24 heures. Le système revient en phase d'initialisation.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne peut être affichée avant d'avoir entré un étalonnage dans l'application mobile MGC Eversense.</p> | <p>Fin de vie du transmetteur 366 Apparaît lorsque votre transmetteur a été utilisé pendant 365 jours et que votre transmetteur n'est plus garanti.</p> <p>Après 395 jours d'utilisation, votre transmetteur ne fournit plus de valeur de taux de glucose.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. En phase d'initialisation, vous devez réaliser 4 étalonnages par piqûre au doigt, espacés de 2 à 12 heures les uns des autres. L'affichage des valeurs du taux de glucose reprend après le 2ème étalonnage par piqûre au doigt réussi.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)



Alertes

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Fin de vie du transmetteur 395 Apparaît lorsque votre transmetteur n'est plus garanti depuis 30 jours.</p> <p>Après cette alerte, aucune valeur de taux de glucose ne peut s'afficher jusqu'à ce que vous remplaciez votre transmetteur.</p> | <p>Fin de vie du transmetteur 396 Apparaît lorsque votre transmetteur a été utilisé pendant 395 jours.</p> <p>Aucune valeur de taux de glucose ne peut s'afficher jusqu'à ce que vous remplaciez votre transmetteur.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> |

14


Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Lumière ambiante trop forte Apparaît toutes les 60 minutes lorsque votre capteur reçoit trop de lumière ambiante, ce qui affecte sa capacité à communiquer avec le Smart Transmetteur. Aucune valeur du taux de glucose ne s'affichera tant que vous n'avez pas réduit la lumière ambiante.</p> | <p>Température transmetteur élevée Ce message apparaît toutes les 20 minutes lorsque votre Smart Transmetteur est trop chaud. Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que la température du Smart Transmetteur n'est pas revenue dans la plage normale de fonctionnement.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Réduisez la lumière ambiante en faisant l'une au moins des choses suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Mettez-vous dans un endroit moins lumineux.• Placez un matériau sombre sur le Smart Transmetteur.• Portez le Smart Transmetteur sous un vêtement. | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Faites refroidir le Smart Transmetteur en le mettant dans un environnement plus frais. Une fois que la température du Smart Transmetteur est en-dessous de 42 °C (108 °F), il se remet à afficher les valeurs du taux de glucose. Vous pouvez temporairement enlever le Smart Transmetteur pour le laisser refroidir. Une fois que le Smart Transmetteur est revenu à une température plus basse, assurez-vous de le remettre en place au-dessus du capteur.</p> |



Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Température capteur faible Ce message apparaît toutes les 20 minutes lorsque la température du capteur est trop basse. Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que la température du capteur n'est pas revenue dans la plage normale de fonctionnement.</p> | <p>Température capteur élevée Ce message apparaît toutes les 20 minutes lorsque le capteur est trop chaud. Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que la température du capteur n'est pas revenue dans la plage normale de fonctionnement.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Déplacez-vous dans un environnement plus chaud pour faire augmenter la température du capteur. Gardez votre Smart Transmetteur allumé, de manière à ce que l'affichage du taux de glucose reprenne dès que la température du capteur est comprise entre 26 °C et 40 °C (81 °F - 104 °F).</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Déplacez-vous dans un environnement plus frais pour abaisser la température du capteur. Retirez brièvement le Smart Transmetteur pendant que la température du capteur revient dans la plage comprise entre 26 °C et 40 °C (81 °F - 104 °F). Puis, remettez en marche le Smart Transmetteur pour recevoir de nouveau les valeurs de glucose du capteur.</p> |



Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

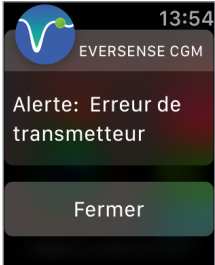Alertes

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Erreur Smart Transmetteur Apparaît lorsque les contrôles internes du système détectent une erreur du Smart Transmetteur. Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que l'erreur n'est pas corrigée.</p> | <p>Vérification du capteur Ce message apparaît lorsque les vérifications internes du système détectent une instabilité du capteur, laquelle nécessite un retour à la phase d'initialisation de l'étalonnage.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Suivez les étapes décrites ci-dessous dans la section <i>Dépannage</i> pour réinitialiser votre Smart Transmetteur. Si vous ne parvenez pas à réinitialiser votre appareil, contactez le Support clientèle.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. En phase d'initialisation, vous devez réaliser 4 étalonnages par piqûre au doigt, espacés de 2 à 12 heures les uns des autres. L'affichage des valeurs du taux de glucose reprend après le 2ème étalonnage par piqûre au doigt réussi.</p> |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)



Alertes

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Moteur du vibreur Apparaît toutes les 60 minutes lorsque le moteur du vibreur sur votre Smart Transmetteur ne peut plus fournir d'alerte par vibration sur le corps. Les valeurs du taux de glucose continueront à s'afficher pendant un maximum de 72 heures après réception de ce message d'alerte. Après 72 heures, vous recevrez une alerte Erreur de transmetteur toutes les 20 minutes jusqu'à ce que vous remplaciez le Smart Transmetteur.</p> | <p>Erreur pile Apparaît lorsque les contrôles internes du système détectent une erreur avec la pile du Smart Transmetteur. Les valeurs du taux de glucose continueront à apparaître, mais votre Smart Transmetteur devra être remplacé.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Contactez le Support clientèle pour demander un Smart Transmetteur de rechange au plus vite.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> |

14

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Données indisponibles Apparaît lorsque les contrôles internes du système détectent une erreur du système. Aucune valeur du taux de glucose ne s'affiche tant que l'erreur n'est pas corrigée.</p> | <p>Erreur Heure du système Apparaît lorsque le système détecte des heures différentes entre l'horloge de votre appareil mobile et l'horloge du système.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Branchez le chargeur avec le câble dans une prise murale ou un port USB. Placez le Smart Transmetteur dans le chargeur et retirez-le. Si les conditions persistent, suivez les étapes décrites ci-dessous dans la section <i>Dépannage</i> pour réinitialiser votre Smart Transmetteur. Si vous ne parvenez pas à réinitialiser votre appareil, contactez le Support clientèle.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Réglez l'horloge de votre appareil mobile à l'heure locale actuelle. Si le problème persiste, contactez le Support clientèle.</p> |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Alertes

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Affichage sur l'Apple Watch |  <p>The screenshot shows an Apple Watch notification at 14:20. The notification header includes the Eversense CGM logo and the text 'EVERSENSE CGM'. The main body of the notification reads 'Alerte: Nouveau mot de passe détecté'. At the bottom, there is a 'Fermer' button.</p> |  <p>The screenshot shows an Apple Watch notification at 14:04. The notification header includes the Eversense CGM logo and the text 'EVERSENSE CGM'. The main body of the notification reads 'Notification: Nouveau capteur détecté'. At the bottom, there is a 'Fermer' button.</p> |
| Description | <p>Nouveau mot de passe détecté Apparaît lorsque le système détecte que le mot de passe a été modifié via votre compte du DMS Eversense.</p> | <p>Nouveau capteur détecté Ce message apparaît lorsque le Smart Transmetteur détecte un nouveau capteur. Le capteur inséré et le Smart Transmetteur doivent être jumelés pour pouvoir communiquer ensemble.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Déconnectez-vous de l'application mobile et reconnectez-vous avec le nouveau mot de passe.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Dans votre application mobile, touchez Relier capt. pour terminer le processus de liaison et commencer la phase d'acclimatation de 24 heures. Vous n'avez pas besoin de porter votre Smart Transmetteur au-dessus du capteur tant que la phase d'acclimatation n'est pas terminée.</p> |

14

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Notifications

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Étalonner maintenant Ce message apparaît lorsque vous devez réaliser un étalonnage lorsque le système est en phase d'initialisation ou après avoir entré un étalonnage très différent du taux de glucose capteur.</p> | <p>Refaire l'étalonnage Apparaît si les données recueillies pendant l'étalonnage sont insuffisantes.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Faites un test de glycémie par piqûre au doigt et entrez la valeur obtenue comme valeur d'étalonnage. N'UTILISEZ PAS une gouttelette de sang provenant d'un autre site (comme l'avant-bras) pour mesurer la glycémie avec le lecteur.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Touchez Étalonner sur votre appareil mobile pour entrer une nouvelle valeur d'étalonnage.</p> |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)



Notifications

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | <p>Nouvel étalonnage requis Ce message apparaît si la valeur d'étalonnage entrée est significativement différente de la valeur du taux de glucose capteur. Après 60 minutes, vous recevrez une notification Étalonner maintenant.</p> | <p>Remplacement du capteur Ce message apparaît 60, 30, 14, 7, 3 et 1 jour(s) avant que votre capteur soit arrivé au bout de sa durée de vie.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Entrez une nouvelle valeur d'étalonnage lorsque vous y êtes invité.</p> | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Prenez rendez-vous avec votre médecin ou professionnel de santé pour retirer et remplacer votre capteur.</p> |

14

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Notifications

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |  |
| Description | 1 étalonnage quotidien Apparaît lorsque le système exige un étalonnage toutes les 24 heures. | 2 étalonnages quotidiens Apparaît lorsque le système exige deux étalonnages par jour. |
| Actions | Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Entrez une nouvelle valeur d'étalonnage lorsque vous y êtes invité. | Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Entrez une nouvelle valeur d'étalonnage lorsque vous y êtes invité. |

Alertes et notifications affichées sur l'Apple Watch (suite)

Notifications

| | |
|-----------------------------|---|
| Affichage sur l'Apple Watch |  |
| Description | <p>Fin de vie du transmetteur Jour 330 Apparaît une fois 35 jours avant l'expiration de la garantie de votre transmetteur.</p> |
| Actions | <p>Confirmer l'alerte sur votre application mobile MGC Eversense. Contactez votre distributeur pour commander un nouveau transmetteur.</p> |

15. Mon Cercle

Surveillance à distance avec le système MGC Eversense E3 et l'application Eversense NOW

L'application Eversense MGC intègre une option de suivi à distance. L'application MGC Eversense interagit avec l'application de suivi du glucose à distance Eversense NOW pour permettre à d'autres personnes d'accéder à vos données.

Risques

Parfois, il n'est pas possible d'envoyer les valeurs du taux de glucose sur l'application Eversense NOW. Si un membre de votre Cercle ne reçoit pas de données de glucose de la part de votre système MGC Eversense E3, il ne peut pas vous aider en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. L'affichage secondaire et les notifications de l'application mobile Eversense NOW ne remplacent pas l'affichage primaire fourni par votre application mobile MGC Eversense.

Les membres de votre Cercle n'ont pas forcément accès à une connexion permettant le transfert des données, comme Internet/le wifi ou le 3G/4G/LTE. Si un membre de votre Cercle ne dispose pas d'une connexion Internet, il ne pourra pas visualiser vos taux de glucose sur un affichage secondaire. Tout problème survenant sur les appareils mobiles, l'Internet sans fil, la connexion pour transmettre les données ou le système de gestion des données (DMS) Eversense peut entraîner un dysfonctionnement de l'affichage des données. Il en est de même si le Smart Transmetteur de l'utilisateur MGC n'est pas à portée du réseau de son appareil mobile ou est en cours de charge. Dans ce cas, les membres de votre Cercle peuvent ne pas recevoir vos données. Vous ne devriez pas compter sur des personnes qui se trouvent à distance pour surveiller votre taux de glucose ni pour vous assister en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie.

La fonction de suivi à distance fournit un affichage secondaire des notifications et des données aux personnes qui sont dans votre Cercle. Ce n'est pas un système de surveillance en temps réel.

Avantages

Utilisé avec l'application de suivi à distance Eversense NOW, le système MGC Eversense E3 donne aux utilisateurs un niveau de confiance supplémentaire, puisque des tiers peuvent à présent voir leurs taux de glucose.

Avertissements

- Les taux de glucose qui s'affichent sur l'application Eversense NOW ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions thérapeutiques. Utilisez toujours des valeurs de glycémie obtenues au moyen d'un lecteur pour prendre vos décisions thérapeutiques. Utiliser un taux de glucose mesuré par un capteur pour prendre une décision thérapeutique pourrait entraîner une hyperglycémie ou une hypoglycémie. L'application Eversense NOW est un affichage secondaire des données MGC Eversense E3 ; il ne remplace pas l'affichage principal.
- Ne vous fiez pas aux personnes qui surveillent votre taux de glucose à distance pour qu'ils vous préviennent en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie.

Mises en garde

- L'application mobile de suivi à distance Eversense NOW ne remplace pas les recommandations de votre professionnel de santé.
- Si vous n'avez pas activé la synchronisation automatique (la fonction qui permet d'envoyer automatiquement des données vers l'application Eversense NOW), vous pourriez avoir des difficultés à partager vos données avec les membres de votre Cercle ; ces derniers ne verront ni vos tendances glycémiques, ni vos épisodes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie.
- Si vous ou l'un des membres de votre Cercle n'avez pas de connexion Internet ou si votre/leur appareil mobile s'est éteint parce qu'il est déchargé, vos données MGC Eversense E3 ne s'affichent pas dans l'application Eversense NOW.
- Si les membres de votre Cercle coupent le son de leur appareil mobile, ils ne recevront pas d'alertes sonores relatives aux données MGC sur leur application Eversense NOW.
- Si vous réglez votre statut sur « Hors-ligne » pour l'un des membres de votre Cercle, il ne recevra pas vos données MGC sur son application Eversense NOW. **NE METTEZ PAS** votre statut en « Hors-ligne » si vous souhaitez que les membres de votre Cercle voient vos données de glucose.

Mises en garde (suite)

- L'application Eversense NOW ne communique pas directement avec le E3 capteur Eversense ni avec le Smart Transmetteur Eversense E3.
- L'application Eversense NOW ne peut pas modifier le paramétrage de l'application MGC Eversense.
- Si l'utilisateur d'Eversense NOW n'autorise pas les notifications depuis l'application Eversense NOW, il ne recevra pas les alertes liées au glucose que vous lui envoyez.
- Si votre appareil mobile est réglé sur « Ne pas déranger », vous n'entendrez pas les notifications provenant de l'application Eversense NOW.


À partir de l'écran **MON CERCLE** sur votre application mobile MGC Eversense, vous pouvez inviter jusqu'à cinq personnes à voir vos données. Lorsque vous invitez quelqu'un à rejoindre votre Cercle, cette personne reçoit un e-mail d'invitation à l'adresse que vous avez fournie. Une fois que l'invitation via e-mail a été validée et que l'application Eversense NOW a été téléchargée, les membres de votre Cercle peuvent consulter vos valeurs du taux de glucose, vos alertes et vos événements les plus récents.

IMPORTANT : les membres de votre Cercle qui ne disposent pas de l'application Eversense NOW ne pourront pas voir vos données.

Tant que votre application pour le système MGC Eversense et que l'application NOW sont connectées à Internet, vos données de glucose seront synchronisées dans l'application Eversense NOW environ toutes les 5 minutes. La synchronisation des valeurs d'étalonnage dans l'application Eversense NOW peut prendre plus longtemps.

Remarque : si vous avez désactivé la synchronisation automatique, vos données de glucose ne seront PAS disponibles dans l'application mobile de suivi à distance Eversense NOW.

1. À partir du menu principal, touchez **Partager mes données >**
Mon Cercle pour afficher l'écran **MON CERCLE**.
2. Pour inviter un nouveau membre à voir vos données de glucose, touchez **Inviter dans mon Cercle**.

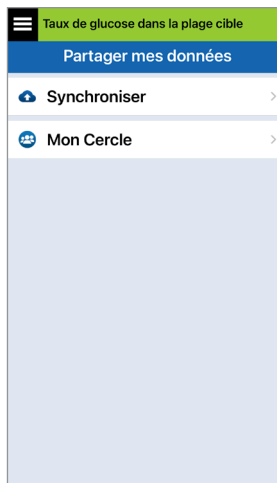


3. Entrez l'adresse électronique de la personne que vous voulez inviter dans votre Cercle et touchez **Envoyer.**

Remarque : vous pouvez toucher le signe **+** qui se trouve en face du champ Email pour sélectionner une adresse électronique de votre liste de contacts.


The screenshot shows a mobile application interface for inviting members to a 'Cercle' (circle). At the top, there is a green header with the text 'Taux de glucose dans la plage cible'. Below this is a blue navigation bar containing a back arrow and the text 'Mon Cercle', followed by the title 'Inviter'. The main content area is light blue and contains two input fields. The first is labeled 'Surnom:' and is empty. The second is labeled 'Email:' and is also empty, with a small blue '+' icon to its right, indicating a contact selection menu. At the bottom of the form is a prominent blue button labeled 'Envoyer'.

Conseil : les surnoms sont optionnels mais ils peuvent vous aider à mieux gérer la liste des membres de votre Cercle. Si vous choisissez de ne pas donner de surnom à un membre de votre Cercle, c'est son adresse e-mail qui apparaîtra à la place de son surnom.

4. Un écran Invitation envoyée apparaît. Tapez sur **OK**.

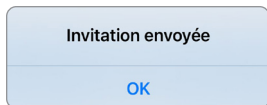


Lorsque l'invitation a été acceptée, le nom du membre apparaît dans votre liste des membres sur l'écran **MON CERCLE** de votre application.

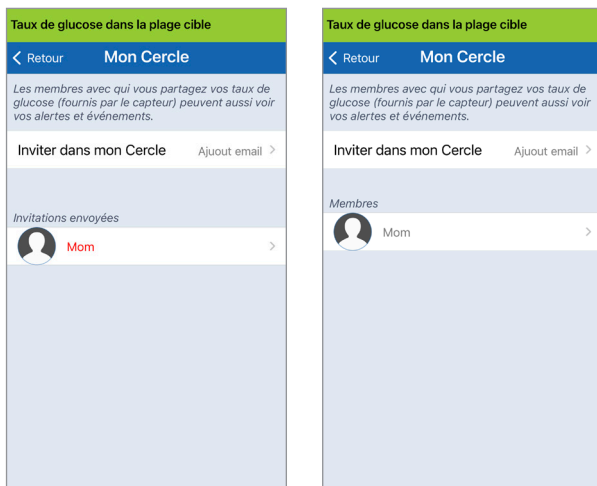



Remarque : les photos de profil des personnes qui ont accès à vos données de glucose à distance sont configurées dans leur compte DMS. Vous ne pouvez pas changer les photos de profil des personnes que vous avez invitées à rejoindre votre Cercle.

Supprimer un membre de votre Cercle

1. Pour supprimer un membre ou une invitation, touchez le nom de la personne concernée dans la liste des membres ou dans la liste des invitations envoyées sur l'écran **MON CERCLE**.

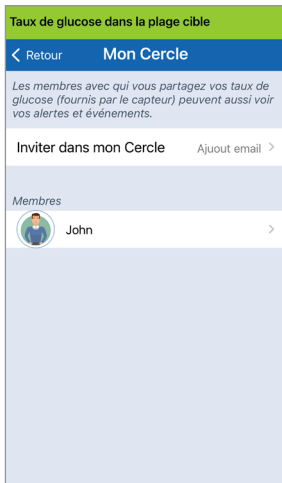

2. Touchez **Supprimer** pour supprimer ce membre de votre Cercle. Touchez **Oui**.

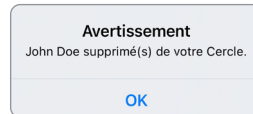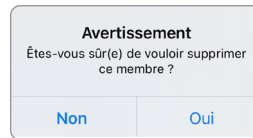


Le membre que vous supprimez sera notifié sur son application Eversense NOW s'il avait préalablement accepté votre invitation.


Suspendre temporairement le partage des données

Il se peut que vous souhaitiez temporairement suspendre le partage des données avec un membre, sans pour autant le retirer de votre Cercle.

1. Touchez le nom du membre dans la liste Mon Cercle pour ouvrir l'écran **MEMBRE**.

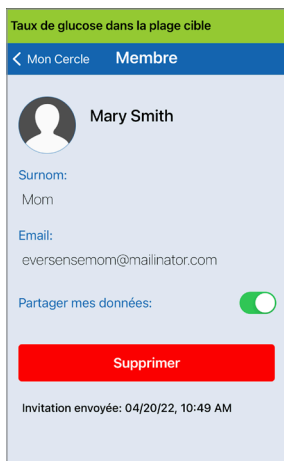

2. Touchez le bouton **Partager mes données** pour activer/désactiver le partage des données avec ce membre.

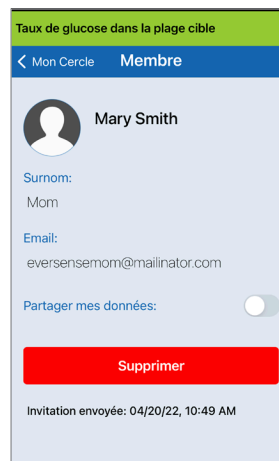

IMPORTANT : si vous avez désactivé la fonction Partager mes données pour un membre, cette personne ne verra aucun de vos résultats ni aucune de vos alertes du taux de glucose MGC Eversense E3. Elle n'aura pas non plus accès à votre historique des événements. Dans ce cas, ce membre vous voit avec un statut « Hors-ligne » sur son application Eversense NOW. Lorsque vous arrêtez le partage des données, cela peut prendre jusqu'à 10 minutes pour que le changement apparaisse sur l'application Eversense NOW de l'utilisateur en question.

Remarque : un utilisateur Eversense NOW peut aussi vous supprimer de son application. Cela peut alors prendre jusqu'à 2 heures pour que ce changement s'affiche dans votre application MGC Eversense.

Pour en savoir plus sur l'application Eversense NOW, consultez la section *Eversense NOW*.

16. À propos du capteur

Cette section décrit le capteur Eversense E3 et comment il est inséré par votre médecin ou professionnel de santé.

Le capteur Eversense E3 est un fluorimètre miniature qui utilise l'intensité fluorescente pour mesurer le taux de glucose dans le liquide interstitiel. Le capteur est implanté sous la peau (en sous-cutané) dans le haut du bras. Une fois implanté, il est totalement invisible. Le capteur reste en place et donne des mesures MGC pendant 180 jours.

Le capteur est recouvert d'un boîtier fait d'une matière biocompatible et il utilise un polymère fluorescent unique capable d'indiquer la présence de glucose. Une diode électroluminescente intégrée dans le capteur excite le polymère et ce dernier signale rapidement les changements de concentration du taux de glucose via des variations de l'intensité lumineuse. La mesure est ensuite relayée au Smart Transmetteur. Les mesures se font automatiquement et ne nécessitent aucune action de la part de l'utilisateur.

Le capteur mesure environ 3,5 mm x 18,3 mm et comporte un anneau en silicone contenant une petite quantité d'acétate de dexaméthasone, un anti-inflammatoire stéroïdien. L'acétate de dexaméthasone minimise la réponse inflammatoire, tout comme cela est pratiqué avec des appareils médicaux similaires, comme les pacemakers.



Capteur Eversense E3

Étapes pour l'insertion

Votre médecin ou professionnel de santé vous expliquera et exécutera les étapes simples et rapides à suivre pour insérer le capteur. Vous serez totalement conscient pendant la procédure d'insertion, qui dure environ 5 minutes.

Site d'insertion :

Il est important de choisir un site sur le bras qui est confortable pour vous, puisque vous aurez à porter le capteur et le Smart Transmetteur sur vous pendant 180 jours. Nous recommandons d'insérer le capteur à l'arrière du haut du bras. Le placement dans cette zone minimise les chances de heurter le capteur et l'émetteur Smart Transmetteur dans les portes, contre les murs ou dans d'autres passages étroits. Si possible, évitez les zones où la peau est molle, comporte des cicatrices, des nævus ou des vaisseaux sanguins susceptibles d'être incisés durant la procédure. Il est recommandé de changer de bras pour les sites d'insertion suivants.

Étape 1 : Préparation du site : le site d'insertion va être nettoyé, désinfecté puis anesthésié avec de la lidocaïne.

Étape 2 : Incision : une petite incision (moins de 1 cm) va être réalisée sur le site d'insertion.

Étape 3 : Insertion du capteur : une poche sous-cutanée va être créée sous la peau et le capteur va être inséré dans cette poche.

Étape 4 : Suture du site : l'incision va être suturée avec un bandage adhésif. On utilise généralement des Steri Strips™ pour suturer l'incision.

Étape 5 : Liaison du capteur et du Smart Transmetteur : reliez le capteur et le Smart Transmetteur pour lancer la phase d'acclimatation de 24 heures.

Remarque : après l'insertion, reliez le Smart Transmetteur et le capteur puis laissez le site cicatriser 24 heures avant de porter le transmetteur.

Le capteur a besoin de 24 heures pour se stabiliser dans le site d'insertion. On appelle cette période la phase d'acclimatation. Au bout de 24 heures après l'insertion, positionnez le Smart Transmetteur sur le capteur, fixez-le solidement et assurez-vous que vous avez établi une connexion (voir *Port quotidien du transmetteur*). Vous pouvez ensuite lancer la phase d'initialisation, laquelle consiste à faire 4 étalonnages à l'aide de gouttelettes de sang et d'un lecteur de glycémie pour pouvoir démarrer la mesure du taux de glucose.

Étapes pour l'extraction

De même, votre médecin ou professionnel de santé vous expliquera les étapes simples et rapides pour à suivre le retrait du capteur, et vous serez complètement éveillé pendant les 5 minutes (approximatives) du processus de retrait.

Étape 1 : Préparation du site : le site du capteur va être nettoyé, désinfecté puis anesthésié avec de la lidocaïne.

Étape 2 : Incision : une petite incision (moins de 1 cm) va être réalisée sur le site du capteur.

Étape 3 : Extraction du capteur : le capteur va être retiré et mis au rebut.

Étape 4 : Suture du site : après le retrait, l'incision va être suturée avec un Steri Strips™ (des sutures peuvent être utilisées selon les préférences du professionnel de santé).

17. Voyages

Cette section décrit les problèmes de sécurité pouvant survenir lorsque vous voyagez avec votre capteur et votre Smart Transmetteur Eversense E3.

Lorsque vous voyagez, votre Smart Transmetteur et votre capteur ne représentent aucun danger pour passer les contrôles de sécurité des aéroports. Nul besoin de les enlever. Vous pouvez informer les services de sécurité que vous avez un dispositif médical implanté.

Votre Smart Transmetteur se synchronisera automatiquement sur l'heure et la date de votre smartphone, y compris lorsque lors d'un changement de fuseau horaire.

Le système MGC Eversense E3 est sans danger pour la plupart des compagnies aériennes. Le Smart Transmetteur Eversense E3 est un dispositif médical portable (M-PED) dont les niveaux d'émissions sont en-deçà des limites fixées par la FAA pour les appareils électroniques durant le vol. (Référence : FAA Advisory, Circular #21-16G, datée du 22.06.2011.) Pour l'utiliser, activez la fonction Bluetooth de votre appareil mobile une fois que vous avez mis votre appareil mobile en mode Avion. Pour les vols hors des États-Unis, suivez les règles de sécurité imposées sur l'usage des dispositifs médicaux en vol.

18. Dépannage

Cette section liste les informations de dépannage de votre système MGC Eversense E3 et présente une Foire aux questions.

Smart Transmetteur

Q : Comment arrêter mon Smart Transmetteur ?

R : Appuyez pendant environ 5 secondes sur le bouton de mise en marche du Smart Transmetteur. Relâchez le bouton lorsque le Smart Transmetteur se met à vibrer.

Q : Comment mettre en marche mon Smart Transmetteur ?

R : Appuyez pendant environ 5 secondes sur le bouton de mise en marche du Smart Transmetteur. Relâchez le bouton lorsque le Smart Transmetteur se met à vibrer.

Q : Comment mettre en place le Smart Transmetteur au-dessus du capteur ?

R : Vous avez deux moyens pour assurer un bon positionnement :

1. Lorsque vous utilisez un adhésif pour fixer le Smart Transmetteur, assurez-vous que le symbole du bouton de mise en marche et la DEL sont l'un en face de l'autre et parallèles à votre bras.
2. Utilisez l'écran **GUIDE DE PLACEMENT** de l'application pour confirmer la connexion entre le capteur et le transmetteur.
 - Touchez **Guide de placement**.
 - Positionnez le Smart Transmetteur au-dessus du capteur, de manière à établir la connexion.

Remarque : pour plus d'informations sur la puissance du signal et la position du transmetteur, voir *Guide de placement – Écran Afficher plus de détails* à la section *Relier le capteur*.

Q : Mon Smart Transmetteur ne vibre pas. Pourquoi ?

R : Si le Smart Transmetteur ne vibre pas, essayez ce qui suit :

- Vérifiez que le Smart Transmetteur est jumelé avec votre appareil mobile.
- Vérifiez que la fonction **Ne pas déranger** est désactivée en touchant **Menu > Paramètres > Paramètres audio**.
- Vérifiez que votre Smart Transmetteur est assez chargé ; rechargez-le au besoin.

Si le Smart Transmetteur ne vibre toujours pas, contactez le Support clientèle ou votre distributeur local pour un dépannage plus approfondi.

Q : Puis-je retirer et réutiliser le même patch adhésif plusieurs fois dans la journée ?

R : Des retraits répétés peuvent réduire le pouvoir d'adhésion.

Q : Quels sont le numéro de série et le numéro de modèle de mon Smart Transmetteur ?

R : Les numéros de série et de modèle sont inscrits au dos de votre Smart Transmetteur. Après avoir jumelé votre Smart Transmetteur et votre appareil mobile, vous pouvez également trouver le numéro de série et le modèle en touchant **Menu > À propos > Mon transmetteur**.

Q : Comment puis-je personnaliser le nom de mon Smart Transmetteur ?

R : Touchez **Menu > Paramètres > Système > Nom du transmetteur**. Tapez le nom de votre choix. Le nom du Smart Transmetteur se met à jour dans l'écran d'état de la connexion.

Q : Pourquoi la DEL orange de mon Smart Transmetteur est-elle allumée en permanence ?

R : Suivez les étapes ci-dessous pour dépanner le Smart Transmetteur :

1. Assurez-vous que le Smart Transmetteur est jumelé à votre appareil mobile.

2. Assurez-vous que le Smart Transmetteur est chargé.
3. Examinez l'écran de l'application pour voir s'il y a des alertes ou des notifications.
4. Retirez le Smart Transmetteur de votre bras et attendez quelques minutes. Un message **Aucun capteur détecté** apparaît et le Smart Transmetteur devrait vibrer plus fréquemment lorsqu'il recherche un capteur. Si le Smart Transmetteur ne vibre pas ou si l'application n'affiche pas **Aucun capteur détecté**, contactez le support clientèle aux États-Unis. En dehors des États-Unis, contactez votre distributeur local. Remettez en place votre Smart Transmetteur au-dessus du capteur pour voir si la Del orange s'éteint et observez les notifications qui apparaissent sur l'application.

Si la DEL orange reste allumée, contactez le Support clientèle.

Recharge de la pile du Smart Transmetteur

Q : Combien de temps dure la pile du Smart Transmetteur si elle est complètement chargée ?

R : Une pile entièrement chargée a généralement une autonomie d'environ 24 à 36 heures.

Q : Combien faut-il de temps pour recharger un Smart Transmetteur ?

R : Il faut environ 15 minutes pour recharger complètement un Smart Transmetteur dans une prise murale. Cela peut être plus long si on le charge via le port USB d'un ordinateur ou lorsque la pile est vide.

Q : Que se passe-t-il si la pile de mon Smart Transmetteur est complètement à plat ?

R : Aucun taux de glucose ne s'affiche. Rechargez toujours le Smart Transmetteur immédiatement lorsque la pile est complètement à plat.

Q : Comment puis-je vérifier l'état de la pile du Smart Transmetteur ?

R : Vous pouvez vérifier l'état de la pile de trois façons :

1. Touchez **Menu > À propos > Mon transmetteur**. Faites défiler l'écran jusqu'à la ligne Niveau de charge de la pile. Il indique quelle est la charge résiduelle de la pile.
2. Contrôlez le symbole de pile dans l'angle supérieur droit de l'écran **MON GLUCOSE**. Une icône de pile rouge indique que la pile du Smart Transmetteur est à plat.
3. Mettez en marche le Smart Transmetteur. Le Smart Transmetteur étant en marche, appuyez sur le bouton de mise en marche brièvement. Si la DEL du Smart Transmetteur est orange, cela signifie que la pile est faible. Si la DEL du Smart Transmetteur est verte, cela signifie que la pile est au moins chargée à 10 %.

Q : Sur la page À propos > Mon transmetteur, le niveau de la pile affiche 65 % puis chute à 35 %. Pour quelle raison ?

R : La vitesse à laquelle la pile se décharge varie en fonction de l'usage ; deux piles identiques sur deux appareils différents ne se déchargeront pas nécessairement à la même vitesse. C'est la raison pour laquelle les indicateurs du niveau de charge de cet écran ont de grands incréments : 100 %, 65 %, 35 %, 10 % et 0 %. Nos tests montrent que l'alerte « Pile faible » se déclenche toujours au moment où le Smart Transmetteur a encore environ 2 heures d'autonomie (soit environ 10 % de charge). Il est important de recharger la pile lorsque vous recevez une alerte de « Pile faible ».

Connexion au Smart Transmetteur

Q : Comment jumeler mon appareil mobile à mon Smart Transmetteur la première fois ?

R : Suivez les étapes ci-dessous pour jumeler votre appareil mobile et votre Smart Transmetteur. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

1. Ouvrez l'application Eversense App.
2. Appuyez trois fois sur le bouton de mise en marche du Smart Transmetteur pour le mettre en mode de « Détection ».
3. Lorsque le Smart Transmetteur clignote en vert et en orange, touchez l'ID du Smart Transmetteur sur l'écran **CONNECTER**. L'application lance le processus de détection.
 - L'ID de votre Smart Transmetteur correspond au numéro de série qui se trouve sur sa face arrière.
4. Lorsque l'application trouve votre Smart Transmetteur, un écran **DEMANDE DE JUMELAGE BLUETOOTH** apparaît.
5. Touchez **Jumeler** pour confirmer le jumelage.
6. Une fois le jumelage terminé, l'application affiche **Connecté** à côté de l'ID du Smart Transmetteur.

Q : Mon Smart Transmetteur et mon appareil mobile ne semblent pas s'être connectés.

R : Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu établir de connexion.

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil mobile et que le nom du Smart Transmetteur ou que son numéro de série apparaît sur la liste des appareils.
- La panne peut être temporaire. Touchez **Menu** > **Connecter**. Si le nom de votre Smart Transmetteur indique **Déconnecté**, touchez le nom du Smart Transmetteur pour le connecter manuellement.
- Votre Smart Transmetteur et votre appareil mobile peuvent être hors de portée l'un de l'autre. Rapprochez votre appareil mobile de votre Smart Transmetteur.
- Votre Smart Transmetteur peut être éteint ou sa pile peut être à plat ou alors il est en cours de charge. Vous aurez peut-être à réactiver la fonction Bluetooth (BLE) du Smart Transmetteur en suivant les étapes ci-dessous.

1. Arrêtez le Smart Transmetteur – Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 5 secondes et attendez la vibration pour confirmer l'arrêt.

2. Attendez 2 secondes et appuyez sur le bouton de mise en marche trois fois pour réactiver le BLE. **(Remarque : lorsque vous réactivez le BLE, ne retirez pas/n'ignorez pas l'appareil jumelé via les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile.)**
3. Appuyez sur le bouton 3 fois de nouveau pour placer le Smart Transmetteur en mode de détection et jumelez-le à votre appareil mobile. Touchez **Menu > Connecter** pour voir si votre Smart Transmetteur est connecté. S'il n'est pas connecté, tapez sur le nom de votre Smart Transmetteur dans la liste.

Si ces étapes ne résolvent pas le problème, vous devez sans doute aller voir les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile et dé-jumeler ou ignorer le Smart Transmetteur puis appuyer 3 fois sur le bouton de mise en marche du Smart Transmetteur pour le re-jumeler. Si le problème persiste, vous devrez redémarrer votre Smart Transmetteur.

Q : Comment réinitialiser mon Smart Transmetteur ?

R : Suivez les étapes ci-dessous.

1. Placez le Smart Transmetteur dans le chargeur et connectez le câble USB. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise murale. (Vous pouvez aussi brancher l'extrémité standard du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.)
2. Maintenez enfoncé le bouton de mise en marche (pendant 14 secondes environ) sur le Smart Transmetteur alors qu'il est connecté au câble USB. Relâchez le bouton de mise en marche.
3. La DEL commence à clignoter au bout de deux secondes environ, ce qui indique que le Smart Transmetteur réalise une séquence d'auto-test. La DEL clignote de différentes couleurs. Une fois l'auto-test terminé, le Smart Transmetteur vibre et une DEL reste allumée en vert ou en orange.
4. Si l'auto-test ne s'achève pas, reprenez les étapes 1 à 3.
5. Si l'étape 3 est réussie, le Smart Transmetteur peut maintenant être utilisé.
6. Déconnectez le Smart Transmetteur du câble USB et procédez au jumelage. Une fois le jumelage terminé, le système passe en phase d'initialisation. Si vous ne parvenez pas à réinitialiser votre appareil, contactez le Support clientèle.

Q : D'autres personnes peuvent-elles se connecter à mon Smart Transmetteur ?

R : Le système MGC Eversense E3 utilise une connexion Bluetooth sécurisée qui ne permet pas à des tiers de se connecter.

Q : Que se passe-t-il si mon Smart Transmetteur est déconnecté de mon appareil mobile ou de mon application ?

R : Le Smart Transmetteur vibre et l'application présente une notification « Transmetteur déconnecté » toutes les 5 à 30 minutes, selon vos paramètres audio, jusqu'au lancement de l'application ou jusqu'au rétablissement de la connexion au Smart Transmetteur. Une fois la connexion rétablie, les données recueillies sont synchronisées avec l'application mobile.

Q : Pourquoi ne puis-je pas connecter mon appareil mobile à mon Smart Transmetteur (le message **Aucun transmetteur connecté apparaît dans la barre d'état de l'application) ?**

R : Le Smart Transmetteur peut avoir des problèmes pour se connecter avec votre appareil mobile pour au moins l'une des raisons suivantes :

- Le Smart Transmetteur est en cours de charge.
- Le Smart Transmetteur est à l'arrêt.

- La pile du Smart Transmetteur est complètement à plat.
- Le Bluetooth de votre appareil mobile est désactivé.
- Le jumelage de votre Smart Transmetteur à votre appareil mobile n'a pas été établi ou les deux dispositifs ont été « dé-jumelés ». Vous devez refaire le jumelage.

Q : Pourquoi la mention **Recherche en cours apparaît-elle sur l'écran **CONNECTER** ?**

R : L'application affiche encore **Recherche en cours** pour au moins l'une des raisons suivantes :

- Le Smart Transmetteur est en cours de charge.
- Le Smart Transmetteur est à l'arrêt.
- La pile du Smart Transmetteur est complètement à plat.
- Le Bluetooth de votre appareil mobile est désactivé.
- Le jumelage de votre Smart Transmetteur à votre appareil mobile n'a pas été établi ou les deux dispositifs ont été « dé-jumelés ». Vous devez refaire le jumelage.

Q : Qu'entend-on par mode de « détection » (jumelage) ?

R : Le mode de détection est un état du Smart Transmetteur qui lui permet d'être localisé par votre appareil mobile pour faire un jumelage. Voir *Prise en main* pour plus d'informations.

Q : Mon Smart Transmetteur n'est pas listé sur l'écran SE CONNECTER ?

R : Le Smart Transmetteur n'est pas listé sur l'écran **SE CONNECTER** pour au moins l'une des raisons suivantes :

- Le Smart Transmetteur est en cours de charge par câble USB.
- Le Smart Transmetteur est à l'arrêt.
- La pile du Smart Transmetteur est complètement à plat.
- Le Bluetooth de votre appareil mobile est désactivé.
- Le jumelage de votre Smart Transmetteur à votre appareil mobile n'a pas été établi ou les deux dispositifs ont été « dé-jumelés ». Vous devez refaire le jumelage.

Q : Pourquoi l'écran SE CONNECTER liste-t-il d'autres Smart Transmetteurs ?

R : Si vous vous trouvez en présence d'autres utilisateurs du MGC Eversense E3, l'application risque de détecter ces appareils. Cependant, l'application ne se connecte qu'au Smart Transmetteur qui a été jumelé avec l'appareil mobile. N'ESSAYEZ PAS de jumeler votre appareil mobile à d'autres Smart Transmetteurs qui ne vous appartiennent pas.

Q : Je viens de recevoir un Smart Transmetteur neuf. Comment puis-je annuler le jumelage de l'ancien et connecter le nouveau à mon système ?

R : Sur le menu principal, touchez **Se connecter**. Tapez sur le nom de votre ancien Smart Transmetteur et laissez votre doigt dessus. Touchez **OK** pour que l'application ne se connecte pas automatiquement à l'ancien Smart Transmetteur. Oubliez l'ancien Smart Transmetteur dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone. Suivez les étapes décrites dans ce Guide de l'utilisateur pour jumeler le nouveau Smart Transmetteur à l'application et pour le relier à votre capteur.

Étalonnage

Q : Quelle heure dois-je entrer dans l'écran ÉTALONNER lorsque je reçois une notification d'étalonnage ?

R : Entrez l'heure à laquelle vous avez testé votre glycémie avec votre lecteur. Vous devez saisir la valeur de la glycémie dans les 10 minutes qui suivent le test.

Q : Pourquoi mon étalonnage a-t-il été rejeté ?

R : Le système peut rejeter un étalonnage pour plusieurs raisons :

- La valeur de glycémie saisie est en-dessous de 2,2 mmol/l.
- La valeur de glycémie saisie est au-dessus de 22,2 mmol/l.

Si un autre étalonnage est nécessaire, le système affiche une invite.

Q : Pourquoi mon étalonnage est-il impossible à effectuer ?

R : Vous pourriez avoir des problèmes pour étalonner votre système pour l'une au moins des raisons suivantes :

- On dispose d'un nombre insuffisant de valeurs du taux de glucose. La collecte de ces valeurs peut prendre jusqu'à 5 minutes.
- Les valeurs du taux de glucose données par le capteur varient rapidement, comme après un repas ou après l'injection d'une dose d'insuline.
- La valeur de glycémie est en-dessous de 2,2 mmol/l.
- La valeur de glycémie est au-dessus de 22,2 mmol/l.
- La glycémie a été réalisée plus de 10 minutes avant sa saisie dans l'application Eversense App.
- La valeur du taux de glucose donnée par le capteur diffère significativement de la valeur de la glycémie mesurée par le lecteur.
- Un étalonnage est en cours.
- Le dernier étalonnage réussi remonte à moins de 1 heure.
- Votre transmetteur est déconnecté.
- Le transmetteur n'est relié à aucun capteur.
- Votre capteur doit être remplacé.

Q : Où puis-je trouver des détails sur la phase d'étalonnage, le nombre d'étalonnages et la date et l'heure du dernier étalonnage ?

R : Vous pouvez consulter les détails de l'étalonnage en touchant **Menu > À propos > Mon transmetteur.**

Q : Quels sont les différents types de phases d'étalonnage ?

R : Le système MGC Eversense E3 a trois types de phases d'étalonnage : la phase d'initialisation, la phase avec 2 étalonnages quotidiens et la phase avec 1 étalonnage quotidien. La phase d'initialisation débute 24h après l'insertion du capteur et requiert 4 tests de glycémie par piqûre au doigt. Le système indique si 1 ou 2 étalonnages sont nécessaires.

Alertes et notifications

Q : Puis-je changer le régime des alertes par vibreur sur mon Smart Transmetteur ?

R : Le régime des alertes par vibreur sur le Smart Transmetteur est fixe et non modifiable. Il est possible de modifier l'intervalle de répétition pour certaines Alertes dans **Paramètres > Paramètres audio.**

Q : Puis-je augmenter le volume des tonalités de l'application provenant de mon appareil mobile ?

R : Vous pouvez augmenter le volume des tonalités de l'application en connectant votre appareil mobile à un amplificateur audio externe.

Q : Puis-je changer le nombre d'alertes que je reçois ?

R : Si vous estimez que vous recevez trop d'alertes, vous devriez d'abord discuter des paramètres d'alerte qui vous conviennent le mieux avec votre médecin ou professionnel de santé. Si vous devez modifier vos réglages d'alerte de glucose, touchez **Menu > Paramètres > Glucose.**

Q : Que sont les alertes du taux de variation ?

R : Les alertes du taux de variation vous signalent quand votre glycémie chute ou augmente plus vite que le réglage que vous avez entré dans

Paramètres > Glucose.

Q : Quelle différence y a-t-il entre une notification et une alerte ?

R : Une notification est un message non critique et peu prioritaire (ex., un rappel d'étalonnage).

Une alerte est un message important qui nécessite votre attention et peut réclamer de prendre certaines dispositions.

Q : Que sont les alertes prédictives ?

R : Les alertes prédictives vous préviennent à l'avance qu'un événement risque de se produire si la tendance en cours continue. Les alertes prédictives utilisent les niveaux d'alerte d'hyperglycémie et d'hypoglycémie que vous configurez pour déterminer quand déclencher une alerte prédictive. Vous pouvez choisir d'être notifié 10, 20 ou 30 minutes à l'avance ou quand le système MGC System prévoit que vous allez atteindre les niveaux d'alertes que vous avez configurés. Votre Smart Transmetteur vibre et votre application émet une alerte et affiche un message sur l'écran

MON GLUCOSE pour vous signaler une hypoglycémie ou une hyperglycémie prévue.

Si vos symptômes ne correspondent pas aux valeurs de glycémie du capteur ou avec les indications des alertes, faites immédiatement un test de glycémie par piqûre au doigt avant de prendre une décision thérapeutique.

Q : Que sont les alertes du taux de variation ?

R : Les alertes du taux de variation vous signalent quand votre glycémie chute ou augmente plus vite que le réglage que vous avez entré dans

Paramètres > Glucose.

Q : Pourquoi je ne vois pas les notifications lorsque l'application est en arrière-plan ?

R : Reportez-vous aux instructions de votre appareil mobile pour activer les notifications en arrière-plan.

Q : Qu'advient-il des notifications si mon application est déconnectée de mon Smart Transmetteur ?

R : Si l'application est déconnectée de votre Smart Transmetteur, mais que vous portez bien votre Smart Transmetteur au-dessus de votre capteur, les alertes reçues pendant cette période seront envoyées à l'application une fois qu'elle est reconnectée et synchronisée avec le Smart Transmetteur.

Q : Comment faire pour trier les notifications sur l'écran HISTORIQUE DES ALERTES ?

R : L'écran **HISTORIQUE DES ALERTES** présente un filtre de tri en haut. Vous pouvez trier les notifications en vous basant sur le niveau de gravité (jaune ou bleu) ou le type d'alerte. Tapez sur l'icône du filtre voulu.

Q : Comment puis-je faire taire les alertes relatives au taux de glucose ?

R : Les alertes relatives au taux de glucose peuvent être réduites au silence en confirmant l'alerte sur votre appareil mobile et en prenant les dispositions qui s'imposent.

Valeurs du taux de glucose

Q. Pourquoi la valeur du taux de glucose donnée par mon capteur est-elle différente de la valeur de glycémie indiquée sur mon lecteur ?

R : Le système MGC Eversense E3 mesure le taux de glucose du liquide interstitiel, entre les cellules du corps. Les différences physiologiques qui existent entre le liquide interstitiel et le sang (obtenu par piqûre au doigt) peuvent être à la source des écarts de valeurs entre le taux de glucose interstitiel et la glycémie. Ces différences sont surtout apparentes durant les périodes au cours desquelles la glycémie varie rapidement (par ex., après avoir mangé, après une injection d'insuline ou après avoir fait de l'exercice), et pour certaines personnes, pendant les premiers jours suivant l'insertion en raison de l'inflammation pouvant résulter de la procédure d'insertion. En moyenne, les taux de glucose du liquide interstitiel sont en retard sur la glycémie de plusieurs minutes. Confirmez les valeurs du capteur en réalisant une mesure de glycémie par piqûre au bout du doigt jusqu'à ce que vous sachiez ce que sont ces différences. Par ailleurs, si vos symptômes ne correspondent pas aux valeurs de glycémie du capteur, confirmez en réalisant une mesure de glycémie par piqûre au bout du doigt.

Q : J'obtiens « --- -- » à la place de la valeur du taux de glucose dans l'application.

R : Vous pouvez ne pas obtenir de valeur du taux de glucose lorsqu'il n'y a pas de connexion entre votre Smart Transmetteur et votre capteur ou entre votre Smart Transmetteur et votre appareil mobile.

Vous pouvez aussi ne pas obtenir de valeur lorsque l'une des alertes ci-dessous est activée :

- Aucun capteur détecté.
- Taux de glucose du capteur en dessous ou au-dessus de la plage cible.
- Température capteur faible.
- Lumière ambiante trop forte.
- Vérification du capteur.
- Température du Smart Transmetteur élevée.
- Température capteur élevée.
- Pile à plat.
- Étalonnage en retard.
- Nouveau capteur détecté.
- Remplacement du capteur.
- Étalonnage expiré.

- Erreur du Smart Transmetteur.
- Alerte de remplacement du transmetteur.
- Alerte de mise hors-service du capteur.

Veillez suivre les instructions fournies dans le message de notification pour éliminer l'alerte.

Décisions de traitement

Q : De quelles informations faut-il tenir compte avant de prendre une décision de traitement ?

R : Avant de prendre une décision de traitement, vous devez tenir compte de la valeur de glycémie du capteur, du graphique de tendance, de la flèche de tendance et de toute alerte du système MGC Eversense E3. Si aucune flèche de tendance n'apparaît, le système n'a pas assez de données pour afficher le sens et la vitesse de variation. Vous ne devez pas prendre de décision de traitement reposant uniquement sur la valeur de glycémie du capteur.

Q : Pourquoi mon taux de glucose est-il gris ?

R : Lorsque le système n'a pas assez de données pour fournir une flèche de tendance, la valeur de glycémie du capteur peut être affichée en gris. Vous ne devez pas prendre de décision de traitement reposant uniquement sur la valeur de glycémie du capteur.

Q : Quand dois-je prélever une gouttelette de sang dans mon doigt et mesurer ma glycémie avec un lecteur ?

R : Vous devez faire un test de glycémie sur un lecteur :

- Lorsqu'il est temps de faire un étalonnage.
- Aucun taux de glucose n'apparaît.
- Aucune flèche de tendance n'apparaît.
- Vos symptômes ne correspondent pas aux données de glucose affichées.
- La valeur actuelle de glucose du capteur apparaît en gris.
- La barre d'état apparaît en orange.
- Vous prenez des médicaments de la classe des tétracyclines.

Flèches de tendance

Q : Mes flèches de tendance ne correspondent pas à mes alertes du taux de glucose.

R : Les flèches de tendance indiquent le sens et la vitesse de variation du taux de glucose. Par exemple, vous pouvez avoir une flèche de tendance qui pointe vers le haut ou vers le bas (indiquant une variation rapide ou lente). Les alertes du taux de glucose vous préviennent quand votre taux de glucose atteint le niveau d'alerte que vous avez défini, quel que soit la vitesse ou le sens de variation.

Q : Ma flèche de tendance est absente.

R : Le système MGC utilise les **20 dernières minutes de données de glucose continues** pour calculer et afficher la flèche de tendance. Lorsqu'il n'y a pas un assez grand nombre de valeurs pour faire le calcul, la flèche n'apparaît pas. Vous ne devez pas prendre de décisions de traitement si vous ne voyez pas un taux de glucose, une flèche de tendance et tenez-compte des alertes et tendances récentes.

Application

Q : Que se passera-t-il si je réinstalle l'application ?

R : Lorsque vous réinstallez l'application, celle-ci télécharge les données de l'historique des 3 derniers jours seulement.

Q : Quelle version de l'application est-elle installée sur mon appareil mobile ?

R : Vous pouvez trouver la version logicielle de l'application en touchant **Menu > À propos > Informations produit**.

Q : Comment mon application va-t-elle se mettre à jour ?

R : Suivez la procédure de mise à jour de votre application mobile via l'Apple App Store ou le Google Play Store.

Q : Quels sont les appareils qui sont compatibles avec l'application Eversense App ?

R : Vous trouverez la liste des appareils compatibles sur le site <https://global.eversensediabete.com/compatibility>.

Q : Puis-je continuer à utiliser mon Smart Transmetteur si j'ai un nouvel appareil mobile ?

R : Vous devrez installer l'application sur votre nouvel appareil mobile et le jumeler avec votre Smart Transmetteur. Les relevés du taux de glucose des 3 derniers jours seront synchronisés dans l'application sur votre nouvel appareil mobile.

Q : Puis-je supprimer mon compte Eversense ?

R : Si vous supprimez votre compte, cette opération sera définitive et vous n'aurez plus accès à vos données MGC sur l'application mobile Eversense ni sur votre compte DMS Eversense. Si vous utilisez l'application mobile Eversense NOW, vous ne pourrez plus consulter vos données MGC Eversense à distance. Vous ne pouvez pas utiliser la même adresse électronique pour créer un nouveau compte. Pour commencer la suppression de votre compte, touchez **Supprimer le compte** sur la page de connexion.

Q : Qu'est-ce que l'option Ne pas déranger ?

R : Lorsque vous activez le mode Ne pas déranger dans les paramètres de l'application Eversense App, l'application mobile cesse d'afficher les alertes non critiques. Le Smart Transmetteur arrête également de donner des notifications par vibreur pour les alertes non critiques. Les alertes critiques seront toujours fournies par le Smart Transmetteur et l'application mobile.

Remarquez que la fonction Ne pas déranger de votre smartphone prend l'ascendant sur l'option Ne pas déranger de votre application. Ainsi, si la fonction Ne pas déranger est activée sur votre smartphone, vous ne recevrez les alertes ni sur le Smart Transmetteur ni sur l'application.

Toutefois, avec les systèmes d'exploitation de certains téléphones, vous pouvez activer les alertes d'hypoglycémie pour contourner les paramètres audio de votre téléphone. Voir *Paramètres audio* pour plus d'informations. Sachez que certaines applications peuvent activer automatiquement Ne pas déranger sur votre téléphone.

Q : Pourquoi ma barre d'état indique-t-elle « Synchronisation en cours » ?

R : « Synchronisation en cours » apparaît dans la barre d'état lorsque l'application de votre appareil mobile se connecte à votre Smart Transmetteur.

Q : Mes paramètres de glucose et de profil temporaire sont grisés et je ne peux pas les régler.

R : Votre application doit être jumelée avec un Smart Transmetteur pour que vous puissiez régler vos paramètres de glucose et de profil temporaire.

Q : Puis-je modifier un événement d'entrée manuelle de glycémie ?

R : Il est impossible de modifier les entrées d'étalonnage et les entrées manuelles de glycémie.

Q : Si je masque un événement, puis-je le restaurer par la suite ?

R : Il est impossible de restaurer les entrées qui ont été masquées.

Q : Quels intervalles de répétition puis-je définir pour l'hypoglycémie et l'hyperglycémie ?

R : Pour Hyperglycémie, l'intervalle de répétition peut être compris entre 15 et 180 minutes, par incréments de 15 minutes. Pour Hypoglycémie, l'intervalle de répétition peut être compris entre 5 et 30 minutes par incréments de 5 minutes.

Capteur

Q : Le capteur peut-il être inséré dans une autre partie du corps que mon bras ?

R : Le système MGC Eversense E3 n'a été testé que dans le bras pendant les études cliniques. Le capteur ne doit pas être inséré ailleurs.

Q : Quand dois-je remplacer mon capteur ?

R : Votre capteur a une durée de vie de 180 jours. Vous recevrez des avis périodiques (60, 30, 14, 7, 3 et 1 jour(s) avant sa péremption) pour vous rappeler qu'il est temps de le remplacer. Contactez votre professionnel de santé pour prévoir le remplacement de votre capteur.

Q : Puis-je prolonger la durée de vie de mon capteur ?

R : Le capteur ne fournira plus de relevés de glycémie au-delà de sa durée de port.

Q : Où trouver le numéro de série du capteur ?

R : Vous pouvez consulter le numéro de série du capteur en touchant **Menu > À propos > Mon capteur**.

Q : Je viens de relier un capteur et un Smart Transmetteur pour la première fois, mais la date et/ou l'heure d'insertion ne s'affiche pas lorsque je touche **À propos > Mon capteur**.

R : Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à 10 minutes. Assurez-vous que le Smart Transmetteur est bien au-dessus du capteur. Confirmez que l'écran **CAPTEUR RELIÉ** présente une coche en regard de Jumelage terminé. Naviguez jusqu'à l'écran **MON GLUCOSE** et attendez 2 minutes environ. Retournez à l'écran **MON CAPTEUR**.

Si la date et l'heure d'insertion correctes ne s'affichent toujours pas, suivez les instructions ci-dessous :

1. Retirez le Smart Transmetteur du site d'insertion. Connectez-le au câble de recharge et à l'alimentation. Branchez l'alimentation au secteur, débranchez-la et déconnectez-la du câble de charge.
2. Remettez en place le Smart Transmetteur au-dessus du capteur. Naviguez jusqu'à **À propos > Mon capteur** et confirmez la date et l'heure d'insertion. Si le problème persiste, contactez le Support clientèle.

Q : Pourquoi le message « Nouveau capteur détecté » apparaît-il ?

R : Ce message apparaît lorsque votre Smart Transmetteur détecte un nouveau capteur, pour que vous puissiez relier le Smart Transmetteur au capteur. Le Smart Transmetteur ne peut être relié qu'à un seul capteur à la fois. Si vous voyez un message **Nouveau capteur détecté** et qu'un capteur est déjà inséré et relié à votre Smart Transmetteur, touchez **Plus tard**. Si vous n'êtes pas sûr(e), contactez le Support clientèle pour plus de détails.

Q : Pourquoi mon système MGC est-il revenu en phase d'initialisation ?

R : Vous revenez en phase d'initialisation pour l'une des raisons suivantes :

- La période d'étalonnage a expiré avant que vous ayez entré une valeur de glycémie obtenue par piqûre au doigt.
- 3 valeurs de glycémie au moins sont significativement différentes des valeurs du taux de glucose données par le capteur.
- Votre Smart Transmetteur n'a pas été chargé dans les 16 heures qui suivent une alerte de pile à plat.

- Si vous changez manuellement l'heure de votre appareil mobile, votre Smart Transmetteur se synchronisera et réinitialisera votre appareil mobile.
- Un nouveau transmetteur a été relié à votre capteur existant. Par exemple, si vous avez remplacé votre transmetteur existant.
- Si le support clientèle vous a demandé de rétablir la liaison avec votre capteur.

Q : Un technicien IRM peut-il porter le système MGC Eversense E3 ?

R : Oui, les techniciens IRM peuvent porter le système MGC Eversense E3. Toutefois, pour les personnes qui passent une IRM avec un champ magnétique statique de 1,5 T ou 3,0 T, le capteur peut rester en place sous la peau, mais le Smart Transmetteur doit être retiré et laissé hors de la pièce. Voir *Informations relatives à la sécurité de l'IRM* pour plus de détails.

Événements

Q : Comment trier mes événements sur l'écran JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS ?

R : L'écran **JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS** présente un filtre de tri en haut de l'écran. Tapez sur l'icône du filtre voulu pour inclure et exclure des événements de la liste. L'option de triage par défaut est de montrer TOUS les événements.

Synchroniser

Q : Pourquoi une barre de progression bleue et blanche apparaît-elle parfois en haut de mon écran ?

R : Vous verrez cette barre de progression de la synchronisation pour plusieurs raisons :

- Votre Smart Transmetteur a été hors de portée de votre capteur pendant un moment, et maintenant il se resynchronise avec lui.
- Vous avez fermé l'application Eversense App puis vous l'avez rouverte.
- La pile de votre appareil mobile était à plat et vous l'avez rechargée.

Raccourcis

Q : Y a-t-il un moyen pour sélectionner une date de données à afficher dans l'écran MON GLUCOSE, au lieu de faire défiler les dates en remontant le temps ?

R : Oui, touchez la barre « Aujourd'hui » juste au-dessus du graphique.

Un pop-up va apparaître, dans lequel vous pourrez sélectionner la date de votre choix à afficher sur le graphe.

Q : Si j'affiche une date et une heure passées sur l'écran MON GLUCOSE, existe-t-il un raccourci pour revenir à la date et à l'heure présentes ?

R : Oui, touchez le taux de glucose/la flèche de tendance pour retourner à la date/heure actuelle sur l'écran **MON GLUCOSE**.

Q : Existe-t-il un raccourci pour aller à l'écran HISTORIQUE DES ALERTES ?

R : Si votre Smart Transmetteur est connecté à l'application, vous pouvez toucher la barre d'état en haut de l'écran pour afficher l'écran **HISTORIQUE DES ALERTES**.

Q : Existe-t-il un raccourci pour aller à l'écran SE CONNECTER ?

R : Si votre Smart Transmetteur est déconnecté de l'application, vous pouvez toucher la barre d'état en haut de l'écran pour afficher l'écran **SE CONNECTER**.

Q : Existe-t-il un raccourci pour entrer un événement comme un repas ou une session d'exercice ?

R : Depuis l'écran **MON GLUCOSE**, touchez le graphique pour afficher l'écran **ENTRÉE D'ÉVÉNEMENTS**.

19. Performance de l'appareil

Cette section liste les caractéristiques de performance de l'appareil.

Étude clinique de la performance

L'innocuité et l'efficacité du système MGC Eversense E3 ont été évaluées dans le cadre de l'étude clinique PROMISE réalisée aux États-Unis. Les données de la section Performance de l'appareil reposent sur les données recueillies pendant l'étude PROMISE avec le nouvel algorithme (SW604) et une légère modification de la conception du capteur (capteur E3). Des évaluations de précision ont été menées en différents points au cours de l'étude et les patients devaient rapporter tous les effets indésirables subis durant l'étude. La section Sécurité reflète tous les sujets (n = 181) de l'étude.

Étude PROMISE

L'étude PROMISE était une étude clinique multisites, prospective, pivotale et non randomisée. Cent quatre-vingt un (181) adultes (de 18 ans et plus) avec un diabète de type 1 ou de type 2 ont participé à l'étude sur 8 sites aux États-Unis. Quatre-vingt seize (96) sujets avaient deux capteurs insérés, un dans chaque bras. Quarante trois (43) des capteurs secondaires étaient des capteurs SBA. Les participants ont interagi avec le système pour l'étalonnage et pour envoyer des notifications non liées aux données de glucose. Toutes les décisions de traitement du diabète ont reposé sur les valeurs de glycémie et les normes de soins cliniques. La précision a été mesurée au cours de visites cliniques d'une journée entière. Ces visites ont été réalisées les jours 1, 7 ou 14, 22, 30, 60, 90, 120, 150 et 180. Lors de chaque visite, la précision des capteurs a été évaluée par rapport à un analyseur de laboratoire standard nommé YSI. Les relevés de glucose ont été comparés au même moment entre l'analyseur de référence et le dispositif de mesure continue. Une visite de suivi de sécurité a eu lieu dix jours après le retrait du capteur.

Tableau 1 – Précision par rapport à YSI dans PROMISE*

| Nombre total de valeurs MGC et YSI qui se correspondent | Pourcentage de relevés du système MGC dans les | | | | MARD |
|---|--|---|---|---|-------|
| | Pourcentage dans les 0,8/15 % de la référence | Pourcentage dans les 1,1/20 % de la référence | Pourcentage dans les 1,7/30 % de la référence | Pourcentage dans les 2,2/40 % de la référence | |
| 12 034 | 87,3 | 93,9 | 98,6 | 99,6 | 8,5 % |

*Valeurs de glycémie comprises entre 2,2 et 22,2 mmol/l.

Précision d'Eversense E3 par rapport à YSI dans l'étude PROMISE

La précision a été mesurée en comparant les valeurs de glycémie du capteur Eversense E3 aux valeurs de glycémie de YSI. Pour les valeurs de glycémie inférieures ou égales à 4,4 mmol/l, la différence absolue moyenne entre les deux résultats a été calculée. Pour les valeurs supérieures à 4,4 mmol/l, la différence relative absolue moyenne a été calculée.

Tableau 2 – Précision par rapport à YSI dans l'étude PROMISE

| Plages des taux de glucose YSI (mmol/l) | Nombre de valeurs MGC-YSI qui se correspondent | Différence relative absolue moyenne (%) |
|---|--|---|
| Global | 12 034 | 8,5 |
| < 2,2* | 0 | -- |
| 2,2 - 3,3* | 592 | 7,5 |
| 3,3 - 4,4* | 1 221 | 7,7 |
| 4,4 - 10,0 | 5 067 | 8,6 |
| 10,0 - 16,7 | 3 300 | 7,4 |
| 16,7 - 19,4 | 1 457 | 6,9 |
| 19,4 - 22,2 | 375 | 6,4 |
| > 22,2 | 25 | 9,5 |

*Pour $YSI \leq 4,4$ mmol/l, les différences de valeurs en mmol/l sont incluses à la place de la différence en pourcentage (%).

La performance a également été mesurée en calculant le pourcentage des valeurs du taux de glucose capteur qui ne diffèrent pas de plus de 0,8 mmol/l ou 15 % de la référence YSI. Ces tableaux indiquent la correspondance de pourcentage à plusieurs niveaux, à différentes plages de taux de glucose et différents jours de port du capteur. Les résultats sur les plages de taux de glucose de 4,4 mmol/l ou moins reflètent le pourcentage des valeurs sur les plages en mmol/l et les résultats sur les plages de taux de glucose supérieures à 4,4 mmol/l reflètent le pourcentage conforme à la référence. Par exemple, les 91,6 % des valeurs de glycémie comprises entre 2,2 et 3,3 mmol/l ne différaient pas de plus 0,8 mmol/l de la valeur de référence.

Tableau 3 – Pourcentage global de correspondance des relevés Eversense E3 dans l'étude PROMISE

| Plage des taux de glucose du système MGC (mmol/l) | MGC et référence YSI qui se correspondent | Pourcentage de relevés du système MGC dans les | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|
| | | Pourcentage dans les 0,8/15 % de la référence | Pourcentage dans les 1,1/20 % de la référence | Pourcentage dans les 1,7/30 % de la référence | Pourcentage dans les 2,2/40 % de la référence | Pourcentage > 2,2/40 % de la référence |
| Global | 12 034 | 87,3 | 93,9 | 98,6 | 99,6 | 0,4 |
| 2,2 - 3,3 | 574 | 91,6 | 96,5 | 98,6 | 99,3 | 0,7 |
| 3,3 - 4,4 | 1 178 | 89,7 | 93,8 | 98,9 | 99,8 | 0,2 |
| 4,4 - 10,0 | 5 078 | 85,1 | 93,2 | 98,5 | 99,6 | 0,4 |
| 10,0 - 16,7 | 3 493 | 87,0 | 93,7 | 98,4 | 99,6 | 0,4 |
| 16,7 - 19,4 | 1 191 | 93,3 | 96,8 | 99,2 | 99,6 | 0,4 |
| 19,4 - 22,2 | 520 | 87,3 | 93,8 | 98,7 | 99,6 | 0,4 |

Tableau 4 – Précision du système Eversense E3 par jour

| Jour | Différence relative absolue moyenne (%) | Pourcentage de relevés du système MGC dans les | | | | |
|----------|---|--|---|---|---|--|
| | | Pourcentage dans les 0,8/15 % de la référence | Pourcentage dans les 1,1/20 % de la référence | Pourcentage dans les 1,7/30 % de la référence | Pourcentage dans les 2,2/40 % de la référence | Pourcentage > 2,2/40 % de la référence |
| Jour 1 | 11,2 | 78,6 | 87,4 | 96,5 | 99,3 | 0,7 |
| Jour 7 | 10,0 | 81,9 | 88,0 | 94,7 | 98,5 | 1,5 |
| Jour 14 | 7,4 | 87,4 | 95,0 | 99,0 | 100,0 | 0,0 |
| Jour 22 | 8,4 | 88,9 | 95,7 | 99,2 | 99,9 | 0,1 |
| Jour 30 | 8,2 | 85,8 | 93,4 | 98,2 | 99,3 | 0,7 |
| Jour 60 | 8,6 | 87,9 | 94,2 | 98,6 | 99,8 | 0,2 |
| Jour 90 | 7,0 | 93,1 | 97,1 | 99,8 | 99,9 | 0,1 |
| Jour 120 | 8,4 | 89,2 | 96,1 | 99,6 | 99,9 | 0,1 |
| Jour 150 | 8,8 | 84,0 | 91,9 | 99,5 | 99,9 | 0,1 |
| Jour 180 | 7,4 | 93,1 | 98,0 | 99,3 | 99,7 | 0,3 |

Performance d'alerte d'Eversense E3

Les tableaux de cette section présentent une évaluation de la performance d'alerte. Le Taux de détection d'événements confirmés indique le pourcentage de fois que le système MGC Eversense E3 a confirmé la valeur de référence en présentant une alerte sur une fenêtre de 15 minutes d'une valeur de référence au-delà du seuil d'alerte défini. Le Taux de détection manquée indique le pourcentage de fois que le système MGC Eversense E3 n'a pas présenté d'alerte sur une fenêtre de 15 minutes d'une valeur de référence au-delà du seuil d'alerte défini. Le Taux d'alertes réelles indique le pourcentage de fois que l'alerte du système MGC a été confirmée par une valeur de référence sur une fenêtre de 15 minutes suite à la présentation de l'alerte. Le Taux d'alertes fausses indique le pourcentage de fois que l'alerte du système MGC n'a pas été confirmée par une valeur de référence sur une fenêtre de 15 minutes suite à la présentation de l'alerte.

Le tableau ci-dessous présente une évaluation de la capacité du système MGC Eversense E3 à détecter des niveaux de glycémie élevés ou faibles et évalue les vrais positifs et les faux positifs parmi les alertes. Ces évaluations apparaissent sous la forme d'un pourcentage des alertes présentées par rapport aux valeurs de référence YSI à différents seuils.

Tableau 5 – Performance d'alerte d'hypoglycémie et d'hyperglycémie Eversense E3 (seuil uniquement) dans l'étude PROMISE

| Paramètre d'alerte (mmol/l) | | Taux de détection d'événements confirmés | Taux de détection manquée | Taux d'alertes réelles | Taux d'alertes fausses |
|-----------------------------|------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Alerte hypo | 3,3 | 76 % | 24 % | 82 % | 18 % |
| | 3,9 | 89 % | 11 % | 90 % | 10 % |
| | 4,4 | 93 % | 7 % | 92 % | 8 % |
| | 5,0 | 96 % | 4 % | 93 % | 7 % |
| Alerte hyper | 6,7 | 99 % | 1 % | 97 % | 3 % |
| | 7,8 | 99 % | 1 % | 96 % | 4 % |
| | 10,0 | 98 % | 2 % | 95 % | 5 % |
| | 11,1 | 97 % | 3 % | 95 % | 5 % |
| | 12,2 | 97 % | 3 % | 95 % | 5 % |
| | 13,3 | 97 % | 3 % | 94 % | 6 % |
| | 16,7 | 88 % | 12 % | 90 % | 10 % |

Le tableau ci-dessous présente une évaluation de la capacité du système MGC Eversense E3 à détecter des niveaux de glycémie élevés ou faibles et des alertes prédictives d'hypoglycémie et d'hyperglycémie et évalue les vrais positifs et les faux positifs parmi les alertes. Ces évaluations apparaissent sous la forme d'un pourcentage des alertes présentées par rapport aux valeurs de référence YSI à différents seuils.

Tableau 6 – Performance d'alerte d'hypoglycémie, d'hyperglycémie et prédictive Eversense E3 (seuil et prédictif) dans l'étude PROMISE

| Paramètre d'alerte (mmol/l) | | Taux de détection d'événements confirmés | Taux de détection manquée | Taux d'alertes réelles | Taux d'alertes fausses |
|-----------------------------|------|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Alerte hypo | 3,3 | 90 % | 10 % | 73 % | 27 % |
| | 3,9 | 94 % | 6 % | 84 % | 16 % |
| | 4,4 | 97 % | 3 % | 87 % | 13 % |
| | 5,0 | 98 % | 2 % | 89 % | 11 % |
| Alerte hyper | 6,7 | 99 % | 1 % | 96 % | 4 % |
| | 7,8 | 99 % | 1 % | 95 % | 5 % |
| | 10,0 | 99 % | 1 % | 93 % | 7 % |
| | 11,1 | 99 % | 1 % | 93 % | 7 % |
| | 12,2 | 98 % | 2 % | 92 % | 8 % |
| | 13,3 | 98 % | 2 % | 91 % | 9 % |
| | 16,7 | 92 % | 8 % | 87 % | 13 % |

Correspondance de tendance de taux de variation Eversense E3

La zone ombrée du tableau ci-dessous représente la correspondance entre les tendances des taux de glucose Eversense E3 et les tendances de la référence YSI alors que la glycémie tend vers différents taux (mmol/l par minute). Par exemple, avec une tendance des taux de glucose comprise entre -0,06 et 0,06 mmol/l/minute, les tendances des taux de glucose Eversense E3 correspondent aux tendances de référence 90 % du temps.

Tableau 7 – Correspondance de tendance de taux de variation Eversense E3 dans l'étude PROMISE

| Tendance MGC (mmol/l/min) | Pourcentage de taux de variation de référence (mmol/l/min) des binômes qui correspondent sur chaque plage de tendances de référence pour chaque plage de TDV MGC | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|--------------|--------|--------|
| | < -0,11 | [-0,11, -0,06) | [-0,06, 0,06] | (0,06, 0,11] | > 0,11 | Total |
| < -0,11 | 24 % | 35 % | 41 % | 0 % | 0 % | 163 |
| [-0,11, -0,06) | 4 % | 36 % | 59 % | 0 % | 0 % | 824 |
| [-0,06, 0,06] | 0 % | 4 % | 90 % | 5 % | 1 % | 8 716 |
| (0,06, 0,11] | 0 % | 1 % | 46 % | 42 % | 11 % | 896 |
| > 0,11 | 0 % | 0 % | 24 % | 40 % | 35 % | 336 |
| | | | | | | 10 935 |

Concordance entre les valeurs Eversense E3 et YSI

La zone ombrée des tableaux ci-dessous indique le pourcentage de valeurs de référence YSI sur la même plage que les valeurs de glycémie du capteur. Par exemple, lorsque le taux de glucose capteur est compris entre 4,4 et 16,7 mmol/l, les valeurs de référence YSI sont sur la même plage 76 % du temps.

Tableau 8 – Concordance avec la plage YSI tous les jours dans l'étude PROMISE

| MGC (mmol/l) | Nombre de valeurs MGC-YSI qui se correspondent | Pourcentage de doublons qui correspondent sur chaque plage de taux de glucose YSI pour chaque plage de taux de glucose MGC (mmol/l) | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | < 2,2 | 2,2 - 3,3 | 3,3 - 4,4 | 4,4 - 6,7 | 6,7 - 8,9 | 8,9 - 11,1 | 11,1 - 13,9 | 13,9 - 16,7 | 16,7 - 19,4 | 19,4 - 22,2 | > 22,2 |
| 2,2 - 3,3 | 574 | 0 % | 62 % | 36 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3,3 - 4,4 | 1 178 | 0 % | 19 % | 66 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4,4 - 6,7 | 2 066 | 0 % | 0 % | 11 % | 76 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 6,7 - 8,9 | 2 067 | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 71 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 8,9 - 11,1 | 1 648 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 66 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 11,1 - 13,9 | 1 437 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 15 % | 68 % | 15 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| 13,9 - 16,7 | 1 353 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 17 % | 56 % | 25 % | 1 % | 0 % |
| 16,7 - 19,4 | 1 191 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 17 % | 70 % | 12 % | 0 % |
| 19,4 - 22,2 | 520 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 51 % | 42 % | 5 % |
| > 22,2 | 155 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 21 % | 52 % | 26 % |

Tableau 9 – Concordance avec la plage YSI le jour 1 dans l'étude PROMISE

| MGC (mmol/l) | Nombre de valeurs MGC-YSI qui se correspondent | Pourcentage de doublons qui correspondent sur chaque plage de taux de glucose YSI pour chaque plage de taux de glucose MGC (mmol/l) | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | < 2,2 | 2,2 - 3,3 | 3,3 - 4,4 | 4,4 - 6,7 | 6,7 - 8,9 | 8,9 - 11,1 | 11,1 - 13,9 | 13,9 - 16,7 | 16,7 - 19,4 | 19,4 - 22,2 | > 22,2 |
| 2,2 - 3,3 | 120 | 0 % | 51 % | 45 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3,3 - 4,4 | 146 | 0 % | 10 % | 54 % | 36 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4,4 - 6,7 | 271 | 0 % | 0 % | 5 % | 70 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 6,7 - 8,9 | 202 | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 62 % | 21 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 8,9 - 11,1 | 124 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 51 % | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 11,1 - 13,9 | 75 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 19 % | 51 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 13,9 - 16,7 | 121 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 24 % | 57 % | 18 % | 0 % | 0 % |
| 16,7 - 19,4 | 86 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 33 % | 64 % | 0 % | 0 % |
| 19,4 - 22,2 | 58 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 84 % | 9 % | 0 % |
| > 22,2 | 25 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 48 % | 48 % | 0 % |

Correspondance de stabilité de l'étalonnage

Le tableau ci-dessous compare le pourcentage de valeurs de glycémie du capteur par rapport à la référence YSI à différents moments après une entrée d'étalonnage. Par exemple, dans le tableau ci-dessous, 89,7 % des valeurs Eversense E3 ne différaient pas de plus de 0,8 mmol/l (pour les relevés de référence de 4,4 mmol/l ou moins) et pas de plus de 15 % (pour les relevés de référence de plus de 4,4 mmol/l) de la valeur de référence 8 à 10 heures après une entrée d'étalonnage.

Tableau 10 – Correspondance de stabilité de l'étalonnage Eversense E3 dans l'étude PROMISE

| Temps écoulé depuis l'étalonnage | Nombre de valeurs MGC-YSI qui se correspondent | Pourcentage de relevés du système MGC dans les | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| | | Pourcentage dans les 0,8/15 % de la référence | Pourcentage dans les 1,1/20 % de la référence | Pourcentage dans les 1,7/30 % de la référence | Pourcentage dans les 2,2/40 % de la référence | Pourcentage > 2,2/40 % de la référence |
| (0, 2) Heures | 2 638 | 88,8 | 94,1 | 98,7 | 99,9 | 0,1 |
| [2, 4) Heures | 1 905 | 87,2 | 94,4 | 98,5 | 99,5 | 0,5 |
| [4, 6) Heures | 1 404 | 85,3 | 93,3 | 98,1 | 99,3 | 0,7 |
| [6, 8) Heures | 1 043 | 83,0 | 91,5 | 97,7 | 99,6 | 0,4 |
| [8, 10) Heures | 1 041 | 89,7 | 93,9 | 98,8 | 99,6 | 0,4 |
| [10, 12) Heures | 1 091 | 87,8 | 94,1 | 97,7 | 99,5 | 0,5 |
| [12, 14) Heures | 590 | 85,8 | 93,4 | 99,0 | 99,3 | 0,7 |
| [14, 16) Heures | 440 | 82,7 | 91,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| [16, 18) Heures | 379 | 87,6 | 93,9 | 99,5 | 100,0 | 0,0 |

Tableau 10 – Correspondance de stabilité de l'étalonnage Eversense E3 dans l'étude PROMISE (suite)

| Temps écoulé depuis l'étalonnage | Nombre de valeurs MGC-YSI qui se correspondent | Pourcentage de relevés du système MGC dans les | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| | | Pourcentage dans les 0,8/15 % de la référence | Pourcentage dans les 1,1/20 % de la référence | Pourcentage dans les 1,7/30 % de la référence | Pourcentage dans les 2,2/40 % de la référence | Pourcentage > 2,2/40 % de la référence |
| [18, 20) Heures | 370 | 90,0 | 97,0 | 98,4 | 99,7 | 0,3 |
| [20, 22) Heures | 436 | 88,3 | 94,5 | 99,5 | 99,8 | 0,2 |
| [22, 24) Heures | 522 | 89,7 | 96,2 | 99,4 | 99,8 | 0,2 |
| [24, 26) Heures | 168 | 93,5 | 98,2 | 99,4 | 100,0 | 0,0 |
| [26, 28) Heures | 7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |

Durée de vie du capteur

La durée de vie du capteur mesure le pourcentage des capteurs qui ont pu fonctionner sur la durée prévue de 180 jours. Dans l'étude PROMISE, 90 % des capteurs ont fonctionné tout au long de la période de 180 jours.

Le nombre moyen de jours était de 175.

Pourcentage de capteurs qui ont duré 60, 120 et 180 jours

| Jours | Durée de vie du capteur | Nombre moyen de jours |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 60 | 98 % | 175 |
| 120 | 98 % | |
| 180 | 90 % | |

Sécurité

L'étude PROMISE a duré 180 jours et le nombre d'effets indésirables associés a été noté. Le système MGC Eversense E3 a été bien toléré lors de l'étude. Au cours des 31 373 jours de port du capteur de l'étude, aucun effet indésirable imprévu n'a eu lieu. 59 effets indésirables ont été signalés chez 37 participants. Aucun de ces effets indésirables n'a entraîné une hospitalisation.

Table 11 – Effets indésirables (tous les sujets, n = 181)

| Type d'effet | Nombre de cas | Nombre de sujets (% des sujets) |
|--|---------------|---------------------------------|
| | 59 | 37 (20,4) |
| Irritation cutanée, emplacement du patch adhésif ou site d'insertion (y compris érythème, prurit, rougeur, dermatite de contact, sérome) | 16 | 11 (6,1) |
| Atrophie cutanée | 4 | 4 (2,2) |
| Hypopigmentation | 4 | 3 (1,7) |
| Infection (liée à la procédure) | 2 | 2 (1,1) |
| Infection (non liée à la procédure) | 1 | 1 (0,6) |
| Meurtrissure | 19 | 11 (6,1) |
| Saignement | 3 | 3 (1,7) |
| Douleur | 7 | 6 (3,3) |
| Engourdissement du bras | 1 | 1 (0,6) |
| Tremblement | 1 | 1 (0,6) |
| Les sutures cutanées adhésives n'ont pas tenu | 1 | 1 (0,6) |

20. Spécifications techniques

Capteur

| Caractéristique | Description |
|---------------------------|---|
| Dimensions | Longueur : 18,3 mm Diamètre : 3,5 mm |
| Matériaux | Homopolymère polyméthylmethacrylate (PMMA) - 86 mg, hydrogel à base d'hydroxyéthylméthacrylate (HEMA) contenant un indicateur de glucose - 2,0 mg, platine - 0,012 mg, silicone - 4,1 mg, acétate de dexaméthasone - 1,7 mg, époxy 301- 2 - 0,62 mg |
| Plage des taux de glucose | 2,2 à 22,2 mmol/L |
| Durée de vie du capteur | Jusqu'à 180 jours |
| Étalonnage | Lecteur de glycémie grand public pour auto-surveillance de la glycémie |
| Plage d'étalonnage | 2,2 à 22,2 mmol/L |
| Stérilisation | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène |

Smart Transmetteur

| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Dimensions | Largeur : 48,0 mm Longueur : 37,6 mm Épaisseur : 8,8 mm |
| Matériaux | Corps : polycarbonate |
| Poids | 11,3 g |
| Alimentation | Piles au lithium rechargeables (non remplaçables) |
| Conditions de fonctionnement | 5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F) |
| Durée de vie | 12 mois |
| Conditions d'entreposage | 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F) |
| Protection contre l'humidité | IP67 : submergé dans 1 mètre d'eau maximum, pendant 30 minutes maximum |
| Protection contre les chocs électriques | Contact avec le patient de type BF |
| Durée de la charge avec un adaptateur CA | 15 minutes pour une charge totale |
| Distance de communication | Entre l'application et le Smart Transmetteur : jusqu'à 24,9 pieds La communication sans fil avec l'application ne fonctionne pas correctement si elle passe par l'eau. La portée diminue si vous vous trouvez dans une baignoire ou une piscine, ou sur un lit à eau, etc. |
| Pression de la cabine | 700 hPa à 1 060 hPa |
| Plage d'humidité relative (sans condensation) | 15 % à 90 % |
| Altitude | 10 000 pieds |

Alimentation et chargeur

| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Classe | II |
| Entrée | Entrée CA, 100 VCA-240 VCA, 50/60 Hz, 0,3 A- 0,15 A |
| Sortie CC | 5 VCC, 1 A (5,0 watts) |
| Protection contre l'humidité (chargeur) | IP22 |

Câble USB* pour la charge et le téléchargement

| Caractéristique | Description |
|-----------------|---------------------|
| Entrée/Sortie | 5 VCC, 1 A |
| Type | USB-A à USB micro-B |
| Longueur | 91 cm (36 pouces) |

*S'il est mal utilisé, le câble USB représente un risque d'étranglement. Le câble USB peut se brancher à l'alimentation ou au chargeur à l'aide d'une prise secteur (CA). Pour isoler le système, débranchez le chargeur/l'alimentation. Si vous rechargez le Smart Transmetteur à l'aide d'un port USB de votre ordinateur, assurez-vous que l'ordinateur est conforme à la norme de sécurité CEI 60950-1 (ou équivalente).

Normes électriques et normes de sécurité

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Le transmetteur est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié dans le tableau qui suit. Le client ou l'utilisateur du transmetteur doit s'assurer que le transmetteur est toujours utilisé dans un tel environnement.


Spécifications relatives à l'immunité électromagnétique du transmetteur

| Test d'immunité | Test d'immunité | Niveau de conformité du transmetteur | Directives relatives à l'environnement électromagnétique |
|--|---|---|---|
| Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2 | ± 8 kV au contact ± 15 kV dans l'air | ± 8 kV au contact ± 15 kV dans l'air | Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage. Si les sols sont couverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être au moins de 30 %. |
| Fréquence de l'alimentation (110 VCA/60 Hz, 230 VCA/50 Hz) Champ magnétique IEC 61000-4-8 | 30 A/m | 30 A/m | Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être d'un niveau typique pour des locaux similaires, comme les commerces et les hôpitaux. |

Normes électriques et normes de sécurité (suite)

Le système MGC Eversense E3 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique détaillé dans le tableau ci-dessous. Les utilisateurs du système s'assureront qu'il est utilisé selon ces spécifications.

Spécifications relatives à l'immunité électromagnétique du système

| Test d'immunité | Niveau de test CEI 60601 | Niveau de conformité du transmetteur | Directives relatives à l'environnement électromagnétique |
|---|---|--------------------------------------|--|
| RF conduite CEI 61000-4-6 (Smartphone uniquement (appareil récepteur)) | ≥ 3 Vrms (150 kHz à 80 MHz) | 3 Vrms | Une interférence est possible dans les environs des équipements marqués du symbole suivant :  |
| RF par rayonnement CEI 61000-4-3 | ≥ 10 V/m à 80 MHz à 2700 MHz (Modulation AM) | 3 Vrms | |

Remarque 1 : à 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

Remarque 2 : ces directives ne sont pas nécessairement applicables dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion sur les structures, les objets et les personnes.

- a. La force des champs provenant de transmetteurs fixes, comme les stations d'émission radio (téléphones cellulaires/sans fil), les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les radios AM et FM, les transmetteurs TV ne sont pas prévisibles en théorie avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique causé par des transmetteurs RF fixes, il faut envisager de faire un relevé électromagnétique sur le site. Si la force du champ mesurée à l'endroit où se trouve le système MGC Eversense E3 est supérieure au niveau de conformité RF indiqué ci-dessus, le système MGC Eversense E3 doit faire l'objet d'une observation rapprochée pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Si l'on observe une performance anormale, des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires, comme une réorientation ou le déplacement du système MGC Eversense E3.
- b. Sur une plage de fréquences de 150 KHz à 80 Mhz, la force des champs devrait être inférieure à 10 V/m.

Normes électriques et normes de sécurité (suite)

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétique

Le système mobile MGC Eversense E3 est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié dans le tableau qui suit. Le client ou l'utilisateur du système doit s'assurer que le transmetteur est toujours utilisé dans un tel environnement.

| Test d'émission | Conformité | Directives relatives à l'environnement électromagnétique |
|--------------------------|------------|--|
| Émissions RF CISPR 11 | Groupe 1 | Le système MGC Eversense E3 utilise de l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. En conséquence, ses émissions RF sont très faibles et ne risquent pas de causer des interférences avec les autres équipements électroniques qui se trouvent aux alentours. |
| Émissions RF CISPR 11 | Classe B | Le système MGC Eversense E3 s'utilise sans problème dans tous les locaux, y compris les locaux domestiques et ceux qui sont directement connectés au secteur public basse tension, lequel alimente tous les locaux à usage domestique. |






Distances de séparation recommandées entre les autres équipements de communication RF portables/mobiles et le smartphone (appareil récepteur).

En ce qui concerne les distances de séparation, suivez les instructions du fabricant du smartphone (ou autre appareil récepteur). Le client ou l'utilisateur du smartphone (ou autre appareil récepteur) peut prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimum entre le smartphone et les autres appareils portables/mobiles de communication RF (transmetteurs) de 30 cm au moins (12 po.). Parmi les appareils portables/mobiles à RF, citons : les moniteurs pour bébé, les casques sans fil Bluetooth, les routeurs sans fil, les fours à micro-ondes, les ordinateurs portables avec adaptateurs Wi-Fi internes, les téléphones cellulaires GSM, les scanners de puces RFID et les détecteurs de métaux portables souvent utilisés par les agents de sécurité.












Symboles utilisés sur l'application mobile MGC Eversense

| Symbole | Explication |
|---|---|
|  | Alerte de taux de glucose Apparaît lorsque le taux de glucose dépasse la plage d'alerte d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. L'icône apparaît sur l'écran HISTORIQUE DES ALERTES . |
|  | Alerte de prévision d'hypoglycémie ou de chute du taux de glucose Indique qu'une alerte de prévision d'hypoglycémie ou de chute du taux de glucose s'est produite. L'icône apparaît sur l'écran HISTORIQUE DES ALERTES et sur la ligne de tendance de l'écran d'accueil. |
|  | Alerte de prévision d'hyperglycémie ou d'augmentation du taux de glucose Indique qu'une alerte de prévision d'hyperglycémie ou d'augmentation du taux de glucose s'est produite. L'icône apparaît sur l'écran HISTORIQUE DES ALERTES et sur la ligne de tendance de l'écran d'accueil. |
|  | Alerte de pile à plat Apparaît lorsque la pile du Smart Transmetteur est à plat. |
|  | Alerte de pile déchargée Apparaît lorsque la pile du Smart Transmetteur est chargée à moins de 10 %. |
|  | Alerte du Smart Transmetteur/Capteur L'icône apparaît sur l'écran HISTORIQUE DES ALERTES . |
|  | Notifications du Smart Transmetteur/Capteur Apparaît en présence de notifications associées au Smart Transmetteur ou au capteur. |
|  | Alerte d'étalonnage Apparaît lorsqu'il y a des alertes d'étalonnage. |










Symboles utilisés sur l'application mobile MGC Eversense (suite)







| Symbole | Explication |
|---|--|
|  | Notification d'étalonnage Apparaît dans l' HISTORIQUE DES ALERTES en présence de notifications associées à l'étalonnage. Cette icône apparaît également sur la ligne de tendance Mon glucose et dans le Journal des événements lors de la consignation manuelle d'une entrée de glycémie. |
|  | Étalonnage accepté Apparaît sur la ligne de tendance de taux de glucose et dans le JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS lorsqu'un étalonnage est entré et accepté. |
|  | Étalonnage en cours Apparaît sur la ligne de tendance de taux de glucose et dans le Journal des événements au cours des 15 minutes environ que dure un étalonnage. Cette icône devient rouge, noire ou bleue lorsque l'étalonnage n'est plus en cours. |
|  | Étalonnage inachevé Apparaît sur la ligne de tendance de taux de glucose et dans le Journal des événements lorsque les données recueillies sont insuffisantes pour terminer l'étalonnage. Par exemple, lorsque le transmetteur est retiré d'au-dessus du capteur au cours de la période d'étalonnage d'environ 15 minutes. |
|  | L'étalonnage ne peut pas être utilisé Apparaît sur la ligne de tendance de taux de glucose et dans le Journal des événements lorsqu'un étalonnage qui a été entré ne peut pas être utilisé. Par exemple, la valeur entrée est inférieure à 2,2 mmol/l ou supérieure à 22,2 mmol/l. Dans ce cas, la valeur d'étalonnage est conservée comme une entrée manuelle de glycémie. |

Symboles utilisés sur l'application mobile MGC Eversense (suite)





| Symbole | Explication |
|--|--|
|  | <p>Connexion au système réussie Apparaît lorsque le Smart Transmetteur est connecté au smartphone et que le capteur est relié au Smart Transmetteur. Les barres indiquent la puissance de la connexion.</p> |
|  | <p>Connexion entre le transmetteur et le capteur Apparaît avant qu'un transmetteur soit relié à un capteur et quand la connexion entre un transmetteur et un capteur est interrompue.</p> |
|  | <p>Connexion entre le transmetteur et l'application mobile Apparaît lorsque la connexion BLE entre le transmetteur et l'application mobile est interrompue.</p> |
|  | <p>Alertes multiples (plusieurs alertes ou événements) Apparaît lorsqu'il y a plusieurs alertes ou plusieurs événements sur un intervalle de temps très court.</p> |
|  | <p>Icônes d'événements Apparaissent sur la ligne de tendance de taux de glucose et dans le JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS après l'entrée d'un événement. Les événements qui peuvent être entrés sont les suivants :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> Glucose</div> <div style="text-align: center;"> Insuline</div> <div style="text-align: center;"> Exercice</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> Repas</div> <div style="text-align: center;"> Santé</div> </div> |
|  | <p>Profil temporaire Apparaît lorsque le profil temporaire est actif.</p> |
|  | <p>Ne pas déranger (NPD) Apparaît lorsque le paramètre NPD est actif.</p> |


Symboles figurant sur l'emballage et sur les appareils

| Symbole | Explication |
|---|--|
|  | Consultez la documentation jointe |
|  | Pictogramme indiquant de consulter le mode d'emploi électronique |
|  | Attention, consultez la documentation jointe |
|  | Utiliser avant |
|  | Fabricant |
|  | Date de fabrication |
|  | Limites de température de stockage |
|  | Numéro de lot |
|  | USB (Universal Serial Bus - Bus sériel universel) |









| Symbole | Explication |
|---|---|
|  | Numéro de pièce |
|  | Numéro de série |
|  | Contact avec le patient de type BF |
|  | Radiation électromagnétique non ionisante |
|  | Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel |
| FCC ID | Un ID FCC est assigné à tous les appareils qui sont sujets à la certification |
|  | Non stérile |






Symboles figurant sur l'emballage et sur les appareils (suite)

| Symbole | Explication |
|---|--|
|  | Les procédures d'imagerie par résonance magnétique (IRM) sont contre-indiquées pour le Smart Transmetteur |
|  | Compatible avec l'IRM. Un article dont l'innocuité dans un environnement d'IRM a été démontrée dans des conditions définies, y compris des conditions de champ magnétique statique, des champs magnétiques dont le niveau varie dans le temps et des champs de radiofréquences. Vous trouverez des informations complètes à la section <i>Informations relatives à la sécurité de l'IRM</i> . |
|  | Directive DEEE 2012/19/EU de l'Union européenne |
|  | À usage unique uniquement |

| Symbole | Explication |
|---|---|
|  | Ne pas restériliser |
|  | Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé |
|  | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène |
|  | Barrière stérile unique : stérilisé à l'oxyde d'éthylène |
|  | La loi des États-Unis (fédérale) n'autorise la vente du système MGC Eversense E3 que sur ordonnance ou par un médecin |
|  | Suives les instructions d'utilisation |
|  | Le label certifie que l'appareil est conforme à la réglementation sur les dispositifs médicaux 2017/745 |

Symboles figurant sur l'emballage et sur les appareils (suite)

| Symbole | Explication |
|---|---|
|  | Dispositif médical (remarque : sur la carte d'implantation, indique le nom du dispositif) |
|  | Identifiant unique |
|  | Date d'insertion |
|  | Centre de santé ou médecin qui réalise l'implantation |
|  | Identification du patient (nom) |
|  | Site Internet d'information au patient |
|  | Importateur |
|  | Représentant autorisé dans la Communauté européenne |

| Symbole | Explication |
|---|---|
|  | Représentant autorisé suisse |
|  | Un seul patient, plusieurs utilisations |
|  | Contient une substance médicamenteuse |
|  | Informations sur le recyclage |
|  | Distributeur |

Garantie limitée applicable au Smart Transmetteur Eversense E3

1. Couverture et durée de la garantie limitée.

Senseonics, Incorporated (« Senseonics ») garantit à l'utilisateur final initial (« vous ») du Smart Transmetteur Eversense E3 (le « Smart transmetteur ») que le Smart Transmetteur sera exempt de défauts matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période d'un an (365 jours) à compter de la date à laquelle vous recevrez le Smart Transmetteur de la part votre médecin ou professionnel de santé (« Période de garantie limitée »). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Cette garantie limitée est accordée à la condition que vous informiez Senseonics par écrit de tout défaut matériel et/ou de fabrication dès sa découverte, et à condition que Senseonics détermine que votre réclamation est effectivement due à un défaut matériel et/ou de fabrication d'origine. Si Senseonics vous fournit un Smart Transmetteur de remplacement conformément aux termes de cette garantie limitée, toute garantie restante sur le Smart Transmetteur original sera transférée au Smart Transmetteur de remplacement, la période de garantie pour le Smart Transmetteur de remplacement prenant fin un an après la date à laquelle vous avez reçu le Smart Transmetteur de la part de votre médecin ou professionnel de santé, et cette garantie sera nulle à l'égard du Smart Transmetteur original.

2. Exclusions à la garantie limitée

La garantie limitée s'applique uniquement au Smart Transmetteur fabriqué par Senseonics. Elle est conditionné par l'obligation que vous utilisez le produit correctement. La garantie limitée ne couvre pas a) les dommages esthétiques, les rayures ou autres dommages des surfaces et des parties exposées lors de l'utilisation normale du produit ; b) les dommages résultant d'un accident, d'une négligence, d'un abus, d'une utilisation incorrecte, de stress physique, électrique ou électromécanique ou d'une modification d'une des pièces quelconques du produit ; c) les équipements qui ont été altérés pour enlever ou rendre illisible le numéro d'identification (ID) ; d) les dysfonctionnements résultant de l'utilisation avec des produits, des accessoires ou des équipements périphériques non fournis ou non approuvés par écrit par Senseonics ; e) les consommables (piles), f) les équipements qui ont été démontés ; et g) les dommages causés par une utilisation, des tests, une maintenance, une installation ou un réglage incorrects.

Le Smart Transmetteur est étanche dans certaines situations, lesquelles sont énumérées dans le Guide de l'utilisateur. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages si le boîtier du Smart Transmetteur est fissuré ou endommagé d'une quelconque autre manière. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux services, équipements ou logiciels connexes pouvant être utilisés avec le Smart Transmetteur.

3. Obligations de Senseonics dans le cadre de la garantie limitée

Votre seul et unique recours, et la seule et unique obligation de Senseonics en vertu de cette garantie limitée est de réparer ou de remplacer, à sa seule discrétion, sans frais pour vous, tout Smart Transmetteur défectueux, à condition que le défaut survienne et qu'une réclamation valide soit reçue par Senseonics pendant la période de garantie limitée. Vous devez retourner le Smart Transmetteur défectueux à un service à la clientèle Senseonics autorisé dans un emballage approprié qui protégera adéquatement le Smart Transmetteur contre d'autres dommages, accompagné de vos nom et adresse, du nom et de l'adresse du médecin ou professionnel de santé auprès duquel vous avez obtenu le Smart Transmetteur, et de la date et du numéro d'identification du Smart Transmetteur. Pour savoir où envoyer le Smart Transmetteur, veuillez visiter notre site Internet <https://global.eversensedidiabetes.com>. Dès réception, si Senseonics détermine que le Smart Transmetteur est couvert par la garantie limitée et que la couverture n'est pas exclue, le Smart Transmetteur sera remplacé dans les plus brefs délais. Si Senseonics détermine que le Smart Transmetteur n'est pas couvert par la garantie limitée, vous pouvez acheter un produit de remplacement, ou si vous voulez que le Smart Transmetteur original vous soit retourné, vous devez prépayer tous les frais d'expédition.

Un Smart Transmetteur réparé ou de rechange est couvert par la même garantie que le produit d'origine pour la période de garantie restante ou pour [30] jours à compter de la date de réparation ou de remplacement du produit.

4. Limites des obligations de Senseonics dans le cadre de la garantie limitée

LA GARANTIE LIMITÉE DE SENSEONICS DÉCRITE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, EN FAIT ET EN DROIT, STATUTAIRE OU AUTRE. SENSEONICS EXCLUT EXPRESSÉMENT ET RENONCE À TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE CE TYPE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À REMPLIR UNE FONCTION DONNÉE, DE NON-CONTREFAÇON, D'EXACTITUDE DES INFORMATIONS FOURNIES OU SURVENANT SUITE À UNE TRANSACTION, À UNE LOI, À UN USAGE OU UNE PRATIQUE COMMERCIALE. SAUF DANS LA MESURE OU CELA EST INTERDIT PAR LA LOI, SENSEONIC N'ENGAGE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE SPÉCIAL, IMMATÉRIEL OU INDIRECT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT SURVENANT D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE LORS DE LA VENTE, DE L'UTILISATION, DE L'UTILISATION INCORRECTE OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LES SMART TRANSMETTEURS OU TOUT SYSTÈME EVERSENSE E3 DE SENSEONICS. CETTE LIMITATION S'APPLIQUE MÊME SI SENSEONICS OU SON AGENT A ÉTÉ PRÉVENU DE TELS DOMMAGES ET EN DÉPIT DE TOUT MANQUEMENT À L'OBJET ESSENTIEL DE CE RECOURS LIMITÉ. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'ÉTEND PAS À DES TIERS AUTRES QUE VOUS-MÊME, L'UTILISATEUR FINAL D'ORIGINE DE CE PRODUIT ET ELLE PRÉCISE VOTRE RECOURS EXCLUSIF. SI UNE PARTIE QUELCONQUE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN VERTU DE LA LOI QUI PRÉVAUT, DANS LES LIMITES OÙ SENSEONICS NE PEUT PAS, À CAUSE D'UNE LOI APPLICABLE, RENONCER À UNE GARANTIE IMPLICITE OU LIMITER SA RESPONSABILITÉ, LE CHAMP D'APPLICATION OU LA DURÉE D'UNE TELLE GARANTIE ET LE DEGRÉ DE RESPONSABILITÉ DE SENSEONICS SERA LE MINIMUM AUTORISÉ EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE.

21. DMS Eversense

Introduction

Utilisation prévue

Le système de gestion des données (DMS) Eversense est conçu pour être utilisé comme accessoire sur des produits MGC Eversense compatibles. C'est une application sur serveur qui sert à visualiser, analyser et mettre en mémoire des informations relatives au taux de glucose provenant du système MGC Eversense.

Pour plus de détails et pour savoir quels navigateurs et quelles versions sont compatibles, rendez-vous sur le site global.eversenseddiabetes.com/compatibility.

IMPORTANT : LE SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES EVERSENSE NE DONNE PAS DE CONSEIL MÉDICAL. NE PRENEZ AUCUNE DÉCISION THÉRAPEUTIQUE SANS AVOIR PRÉALABLEMENT CONSULTÉ L'ÉQUIPE MÉDICALE QUI VOUS SUIT.

Licence d'exploitation pour l'utilisateur final et politique de confidentialité

L'usage du système de gestion des données Eversense est sujet aux termes et conditions de la dernière licence d'exploitation d'Eversense et de sa Politique de confidentialité. Ces documents sont mis à jour périodiquement et sont accessibles à la page global.eversenseddiabetes.com.

Aide et Support clientèle

Si vous ne comprenez pas quelque chose dans ce Guide de l'utilisateur, appelez votre distributeur local ; au besoin, allez à la page global.eversensedibabetes.com pour le localiser.

Prise en main

Le DMS Eversense est une application sur serveur (Web) qui vous permet de télécharger automatiquement les données de votre application mobile Eversense à partir d'un appareil mobile compatible sur Internet, de manière à les garder en mémoire pour consultation ultérieure.

Le logiciel de bureau permet à votre ordinateur de communiquer directement avec l'application Web. Vous pouvez également télécharger automatiquement vos données du Smart Transmetteur à votre compte DMS Eversense avec une connexion câblée en téléchargeant et en installant le logiciel de bureau Eversense Client sur votre ordinateur.

Créer un compte


Pour pouvoir commencer à utiliser le DMS Eversense, vous devez vous enregistrer en tant qu'utilisateur.

Si vous avez déjà créé et enregistré un compte dans l'application mobile Eversense, vous avez déjà un compte DMS Eversense, et n'avez pas besoin de créer ni d'enregistrer un nouveau compte. Accédez à la page suivante pour savoir comment vous connecter à votre compte.

1. Accédez à global.eversensedms.com
2. Cliquez sur « **Créer un compte** »
3. Entrez les informations requises
4. Cliquez sur « **Soumettre** »

Remarque : lorsque vous vous connectez à votre compte pour la première fois, on vous demande de configurer une question de sécurité. C'est une couche de sécurité supplémentaire pour votre compte. Votre e-mail et votre mot de passe enregistrés peuvent maintenant servir d'identifiants de connexion à votre compte DMC Eversense et dans tous les autres produits Eversense.

Pour l'utilisateur MGC Eversense



Data Management System

Français

* Utilisez la même adresse électronique et le même mot de passe que ceux utilisés pour vous connecter à l'application mobile Eversense.

E-mail *

Mot de passe *

* Champ obligatoire


[Se connecter](#)

Besoin d'un compte ? [Créer un compte](#)
[Mot de passe oublié ?](#)

Problèmes pour vous connecter ? [Contactez-nous](#)

Pour vous connecter au DMS Pro d'Eversense pour les professionnels de santé, cliquez [ici](#)

Senseonics



Français

Créer un compte

Prénom *

Nom *

E-mail *

Créer un mot de passe *

- Doit contenir de 6 à 32 caractères
- Au moins une minuscule
- Au moins une majuscule
- Au moins un chiffre
- Au moins un caractère spécial

Confirmez votre mot de passe *

[Suivant](#)

Vous avez déjà un compte ? Veuillez accéder à [Se connecter](#)

Droits d'auteur © 2025 Senseonics® Tous droits réservés.

Se connecter


À chaque fois que vous accédez au DMS Eversense, on vous demande de vous connecter.

1. Accédez à global.eversensedms.com
2. Sur la page **Se connecter**, entrez votre e-mail et votre mot de passe. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront les mêmes que ceux que vous utilisez pour vous connecter à l'application mobile Eversense.
3. Cliquez sur « **Se connecter** »

IMPORTANT : après trois échecs de connexion, votre compte DMS Eversense sera bloqué pendant 10 minutes.

Remarque : si vous êtes inactif sur le site DMS pendant 25 minutes environ, un message apparaît pour vous indiquer de sélectionner « **Continuer** » si vous voulez rester connecté.

Pour l'utilisateur MGC Eversense



Data Management System

Français ▾

* Utilisez la même adresse électronique et le même mot de passe que ceux utilisés pour vous connecter à l'application mobile Eversense.

E-mail *

Mot de passe *

* Champ obligatoire

Se connecter

Besoin d'un compte ? [Créer un compte](#)

[Mot de passe oublié ?](#)

Problèmes pour vous connecter ? [Contactez-nous](#)

Pour vous connecter au DMS Pro d'Eversense pour les professionnels de santé, cliquez [ici](#)

Senseonics.

Avertissement d'expiration de la session

×

Votre session va bientôt expirer.

03:29 secondes restantes

Cliquez sur Continuer pour poursuivre votre session ou sur Se déconnecter pour la quitter immédiatement.

[Se déconnecter](#) **Continuer**

Mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe de connexion, vous pouvez facilement en créer un nouveau.

1. Cliquez sur « **Mot de passe oublié** » sur la page **Se connecter**
2. Entrez votre e-mail lorsque vous y êtes invité
3. Cliquez sur « **Envoyer un e-mail** »

Un message vous informant qu'un e-mail vous a été envoyé avec des instructions pour réinitialiser votre mot de passe apparaît.

4. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur le lien du site Web
Une page vous permettant de créer et de confirmer un nouveau mot de passe s'ouvre.
5. Cliquez sur « **Réinitialiser le mot de passe** »

*Un message confirmant que votre mot de passe a bien été réinitialisé apparaît. Sélectionnez le lien « **cliquez ici** » pour retourner à la page **Se connecter**.*

Tableau de bord du DMS Eversense

Le tableau de bord du DMS Eversense est la page par défaut que vous voyez à chacune de vos connexions au DMS. Cette page contient votre profil, le menu de navigation, le temps de port quotidien d'Eversense, les informations du système, le sélecteur de plage de dates et le rapport de profil de glucose ambulatoire (AGP).

- En haut à droite de la page, vous pouvez accéder à vos informations de **Profil**.
- En haut à gauche de la page, vous voyez un **Menu de navigation**.

The screenshot shows the Eversense DMS dashboard interface. A red box on the left highlights the navigation menu, and another red box on the top right highlights the user profile information.

Navigation Menu (Left):

- Tableau de bord
- Rapports
- Paramètres
- Transmetteur
- Partage de données
- Aide

User Profile (Top Right): jeangarc9@gmail.com

Dashboard Content:

Tableau de bord

Date de la dernière synchro : Mercredi 04-Jun-2025 03:10 PM Français

| Informations système | | Paramètres du glucose | |
|--|---|-----------------------|--------------------|
| Transmetteur: 701048 | Cible: | Faible: 3,9 mmol/L | Élevé: 10 mmol/L |
| Capteur: 78000000000000079 | Alerte: | Faible: 3,6 mmol/L | Élevé: 13,9 mmol/L |
| Date de liaison du capteur: 08-Août-2024 | Jours depuis la liaison du capteur: 229 | | |

Tempo de port quotidien d'Eversense: 97,2 %

Période: 02-Fév-2025 - 15-Fév-2025

7 derniers jours | 14 derniers jours | 30 derniers jours | 60 derniers jours | 90 derniers jours | **Page personnalisée**

Profil


La fonction Profil vous permet de modifier votre mot de passe et votre profil utilisateur ou de vous déconnecter du logiciel DMS Eversense.

Si vous voulez changer votre mot de passe de connexion, il est possible d'en configurer un nouveau très simplement.


Pour modifier votre mot de passe :

1. Cliquez sur votre nom d'utilisateur

Un menu déroulant apparaît avec la photo de votre profil, votre dernière connexion et les options pour visualiser/modifier votre profil ou pour vous déconnecter.

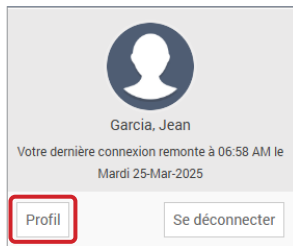

2. Cliquez sur « Profil » pour accéder aux Paramètres du profil utilisateur

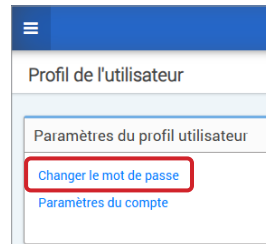

3. Cliquez sur « Changer le mot de passe » pour afficher et modifier votre mot de passe actuel

4. Entrez votre Mot de passe actuel
5. Entrez et confirmez votre nouveau mot de passe
6. Cliquez sur « **Changer le mot de passe** » pour enregistrer vos modifications

Changer le mot de passe

Changer le mot de passe

Si vous modifiez votre mot de passe, vous devrez vous déconnecter de votre application mobile Eversense et vous reconnecter pour continuer à synchroniser vos données dans Eversense DMS.

La modification de votre mot de passe entraînera la déconnexion de votre compte Eversense de tout service tiers auquel vous auriez connecté votre compte. Vous devrez reconnecter votre compte Eversense à l'autre service pour continuer à partager vos données.

La modification de votre mot de passe n'entraîne PAS votre déconnexion du partage des données avec Eversense NOW ou de votre fournisseur via Eversense DMS Pro.

Mot de passe actuel *

Nouveau mot de passe *
• Doit contenir de 8 à 32 caractères
• Au moins une minuscule
• Au moins une majuscule
• Au moins un chiffre
• Au moins un caractère spécial

Confirmez le nouveau mot de passe *

[Retour au profil](#) [Changer le mot de passe](#)

IMPORTANT : après avoir modifié votre mot de passe dans le DMS, vous devrez vous déconnecter de l'application mobile Eversense et vous reconnecter avec le nouveau mot de passe.

Pour modifier votre profil :

1. Cliquez sur « Paramètres du compte »

2. Entrez les informations que vous allez modifier

Vous pouvez changer de photo de profil en appuyant sur le bouton « **Choisir un fichier** » et en sélectionnant une photo depuis les fichiers de votre ordinateur. La photo du profil utilisateur sera changée sur tous les produits compatibles avec le système Eversense.

Paramètres du compte

Informations du profil





Photo du profil Choose File no file chosen

Prénom *

Nom *

Numéro de portable *

Date de naissance * 

Sexe * ▼

Type de diabète ▼

Question de sécurité * ▼


Réponse *

Afficher la réponse


3. Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications



La page Paramètres du profil utilisateur réapparaît. Pour revenir au tableau de bord, cliquez sur « **Tableau de bord** » en haut à gauche du menu de navigation.

Menu de navigation

Le menu de navigation se trouve en haut à gauche du tableau de bord AGP. Vous pouvez ouvrir ou fermer le menu de navigation en cliquant sur . Cliquez sur l'un des boutons du menu pour sélectionner une option.

Remarque : vous pouvez aussi sélectionner votre langue favorite en cliquant sur la langue.

Vous pouvez cliquer sur l'icône  pour développer la sélection dans le menu de navigation.

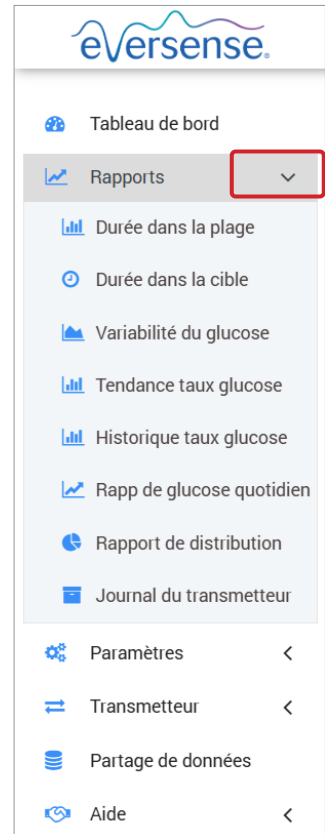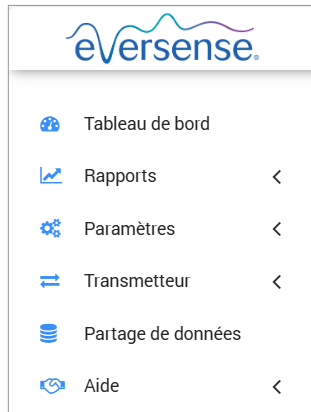


| Options de menu | Fonctions |
|---------------------------|---|
| Tableau de bord | Retour au tableau de bord |
| Rapports | <p>Afficher, imprimer et partager des rapports</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durée dans la cible • Durée dans la plage • Variabilité du glucose • Tendence taux glucose • Historique taux glucose • Rapport de glucose quotidien • Rapport de distribution • Journal du transmetteur |
| Paramètres | <p>Paramètres du DMS Eversense</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glucose • Rapport récapitulatif |
| Transmetteur | Télécharger l'application Client |
| Partage de données | Relier le compte DMS à Clinic DMS Pro |
| Aide | <ul style="list-style-type: none"> • À propos • Contact • Désactiver le compte • Notes de version |

Configuration de la plage de dates

En haut du tableau de bord, vous trouverez des options de plages de dates prédéfinies, ainsi que l'option de définir vous-même votre plage de dates. Ceci aura un impact sur les données utilisées pour les analyses et sur la manière dont elles s'affichent sur le tableau de bord AGP et dans tous les rapports.

Pour régler vos paramètres de plage de dates :

1. Si vous voulez afficher un jeu de données en dehors des plages de dates prédéfinies, cliquez sur le bouton « **Plage personnalisée** » pour afficher un calendrier déroulant

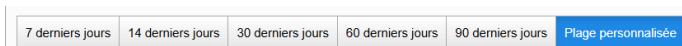


Une fenêtre contextuelle apparaît et permet de sélectionner votre plage de dates personnalisée.

Remarque : les données accessibles dans DMS couvrent une année entière.


2. Sélectionnez la **Date de début** du rapport souhaitée

3. Sélectionnez la **Date de fin** du rapport souhaitée

4. Cliquez sur « **OK** » une fois terminé

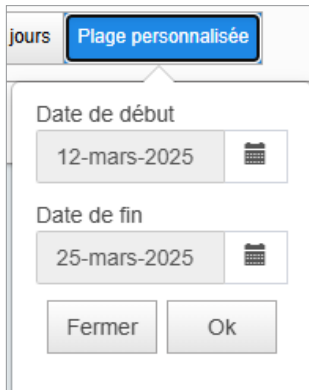

Une fenêtre contextuelle intitulée "Plage personnalisée" avec un bouton "jours" à gauche. Elle contient deux champs de date : "Date de début" avec la valeur "12-mars-2025" et "Date de fin" avec la valeur "25-mars-2025". À droite de chaque champ se trouve un petit pictogramme de calendrier. En bas de la fenêtre, il y a deux boutons : "Fermer" et "Ok".

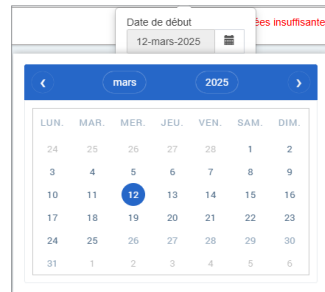

Temps de port quotidien d'Eversense et Informations du système

Temps de port quotidien d'Eversense

Le Temps de port quotidien d'Eversense est le pourcentage de temps de port du Smart Transmetteur sur la plage de dates que vous avez sélectionnée. 100 % correspond à 23,5 heures quotidiennes de port du Smart Transmetteur. Ce pourcentage n'inclut pas les temps pendant lesquels le glucose n'est pas affiché. Par exemple : le début de la phase d'initialisation ou lorsqu'une alerte est activée et empêche d'afficher le taux de glucose.

| |
|---------------------------------------|
| ○ Temps de port quotidien d'Eversense |
| 100 % |

Informations du système : la section Informations du système se situe en haut du Tableau de bord AGP.


Cette section indique :

- N. de série transmetteur
- N. de série du capteur
- Paramètres du glucose : il est possible de modifier les paramètres du glucose dans le DMS et dans votre application mobile Eversense (voir *Paramètres* pour plus d'informations).
- Date de liaison du capteur
- Jours depuis la liaison du capteur

| Informations système | | Paramètres du glucose | |
|---|--------|---|--------------------|
| Transmetteur: 701048 | Cible | Faible: 3,9 mmol/L | Élevé: 10 mmol/L |
| Capteur: 7600000000000079 | Alerte | Faible: 3,6 mmol/L | Élevé: 13,9 mmol/L |
| Date de liaison du capteur: 08-Aoû-2024 | | Jours depuis la liaison du capteur: 229 | |

AGP dans DMS

Le rapport principal du Tableau de bord du DMS Eversense est le rapport AGP (Profil de glucose ambulateur), qui affiche les données de glucose dans 3 sections.

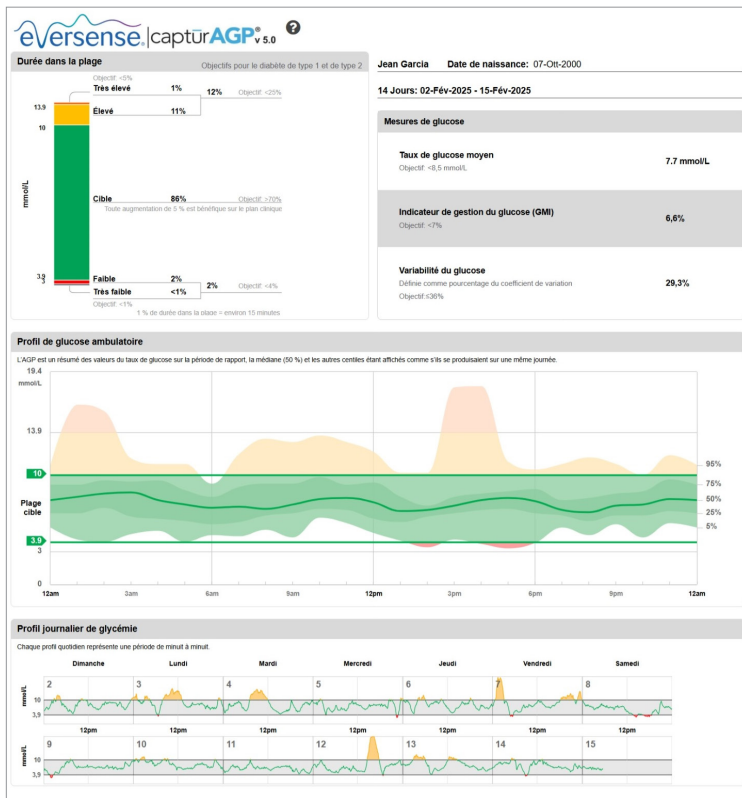


Section 1 : Statistiques du taux de glucose et objectifs

Plages de glucose et objectifs : ce tableau affiche vos valeurs calculées sur chaque plage de glucose sous forme de pourcentage des mesures du dispositif sur une journée de 24 heures. Il est possible de convertir les pourcentages en minutes/heures de sorte que chaque 1 % de durée dans la plage corresponde à environ 15 minutes.

- **Durée dans la cible** : idéalement, les valeurs du taux de glucose sont dans la plage cible
- **Faible/très faible** : Objectif : peu de valeurs faibles ou très faibles ; réduire les valeurs faibles vous permet de vous sentir mieux
- **Élevée/très élevée** : Objectif : peu de valeurs élevées ou très élevées ; réduire les valeurs élevées permet de réduire votre valeur HbA1c au fil du temps

Nombre de jours dans le rapport et dates : par défaut, l'AGP correspond aux données des 14 derniers jours, mais il est possible de sélectionner une plage de dates personnalisée (voir *Configuration de la plage de dates* plus tôt dans cette section).

- **Taux de glucose moyen (moyenne) :** toutes les valeurs de glucose additionnées, le tout divisé par le nombre de résultats.
- **Indicateur de gestion du glucose (GMI) :** calculé à partir des valeurs moyennes de glucose ; estime votre futur laboratoire HbA1c.
- **Variabilité des taux de glucose :** écart entre les valeurs de taux de glucose la plus haute et la plus basse ; idéalement, une valeur faible inférieure ou égale à 36 % [pourcentage du coefficient de variation].

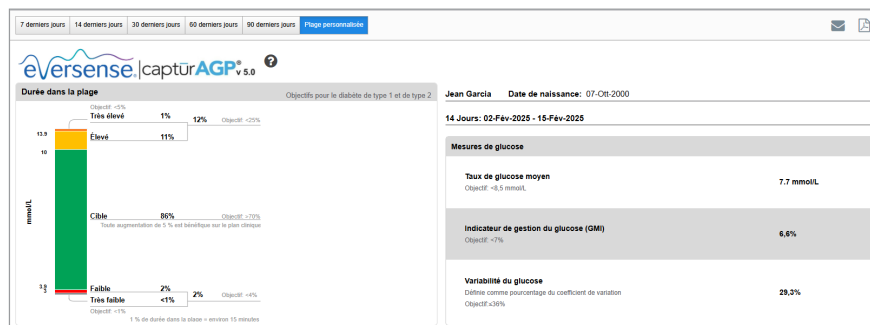


Source : <http://www.agpreport.org/agp/agpreports>

Section 2 : Profil de glucose ambulatoire : tous les profils de glycémie de la plage de dates sélectionnée sont combinés pour créer l'image d'un jour (24 heures). Idéalement, les lignes restent dans la **zone entourée de vert** (plage cible).


Ligne épaisse : ligne médiane (au milieu) séparant les valeurs de glucose en deux avec la moitié supérieure des valeurs d'une part et la moitié inférieure des valeurs d'autre part ; idéalement, cette ligne est généralement plate et à l'intérieur de la zone cible verte de 3,9 à 10,0 mmol/l.

Ombre foncé : la zone plus foncée représente 50 % des valeurs de glucose ; idéalement, l'espace entre les deux est étroit.

Ombre clair : 5 % des valeurs sont au-dessus (ligne du haut de 95 %) et 5 % sont en dessous (ligne du bas de 5 %) ; idéalement, la zone ombrée claire est le plus près possible de la zone ombrée foncée.

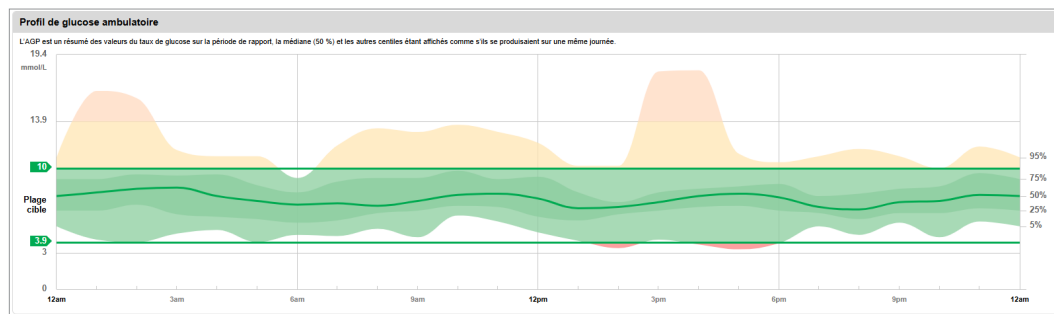

Section 3 : Profils journaliers de glycémie : Chaque boîte comprend le modèle de glucose d'un seul jour. Elle n'apparaît que si votre plage de dates est définie sur 14 jours ou moins.

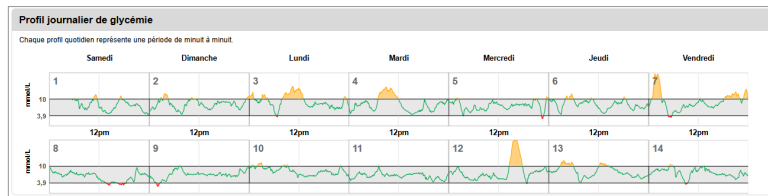

Source : <http://www.agpreport.org/agp/agpreports>

Rapports supplémentaires

L'une des fonctions clés de l'application DMS Eversense est la capacité à générer, imprimer et partager des rapports détaillés de votre historique des taux de glucose. Les rapports vous permettent de structurer et de visualiser vos valeurs du taux de glucose sur des plages de temps allant de courts moments à un jour, une semaine ou sur plusieurs semaines ou mois.

Remarque : si vous sélectionnez un rapport et qu'aucune donnée n'apparaît, vérifiez que les données du taux de glucose ont bien été téléchargées pour la plage de dates sélectionnée. Si, après cette vérification, vous ne voyez toujours pas de données, contactez le Support clientèle.

Filtrer, imprimer ou envoyer par e-mail le contenu des rapports

Vous trouverez en haut à droite des pages de rapports des options permettant de modifier les préférences du rapport, d'imprimer le rapport et de l'envoyer par e-mail.

| Cliquez sur | | | |
|--------------------|--|---|---|
| Pour | Modifier les filtres du rapport | Envoyer le rapport par e-mail | Enregistrer le rapport au format PDF |
| Comment | <p>Faites vos sélections pour choisir quels types d'événements, jours de la semaine et autres options apparaissent dans les rapports, le cas échéant. Ce filtre n'est pas disponible pour les rapports AGP, Durée de conservation dans la plage par heure de la journée, Durée dans la cible ni Glucose quotidien.</p> | <p>Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour envoyer par email un rapport imprimable à un destinataire que vous spécifierez.</p> | <p>Cliquez sur l'icône pour convertir votre rapport au format PDF, ce qui vous permettra de l'imprimer chez vous.</p> |

Durée dans la cible


Le rapport Durée dans la cible présente un diagramme circulaire qui analyse le pourcentage du temps pendant lequel votre taux de glucose est en-dessous, au-dessus ou à l'intérieur de la plage cible définie dans vos paramètres du glucose.

Affichage du rapport :

La partie verte représente le pourcentage de temps que vous avez passé dans votre plage cible.

La partie grise représente le pourcentage de temps que vous avez passé au-dessus de votre plage cible.

La partie rouge représente le pourcentage de temps que vous avez passé en-dessous de votre plage cible.

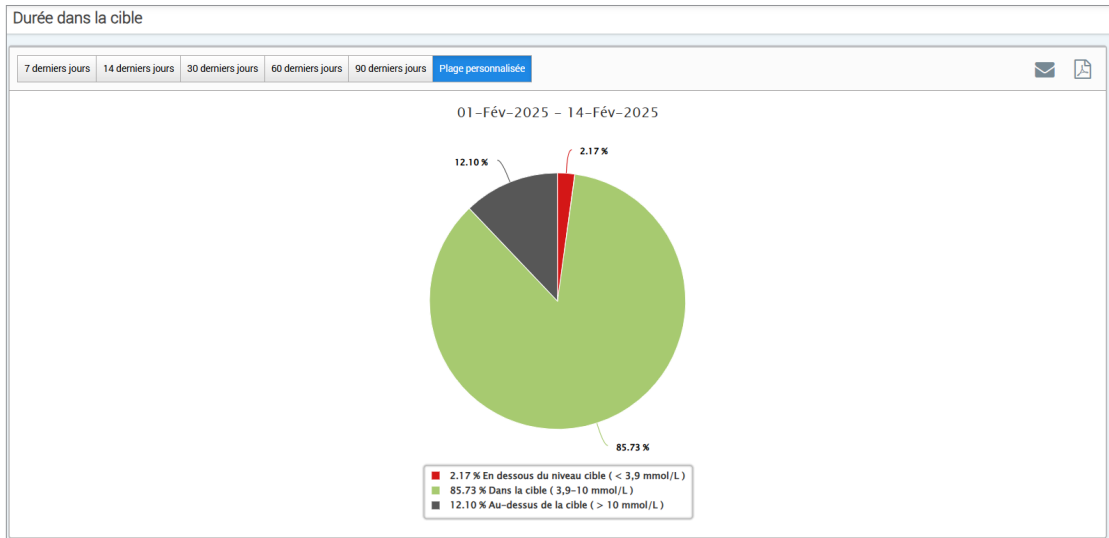

Durée dans la plage

Durée de conservation dans la plage par heure de la journée


Le rapport Durée de conservation des valeurs dans la plage par heure de la journée présente un ensemble de diagrammes qui analysent le pourcentage du temps que votre glucose passe dans les plages de glucose prédéfinies.

- Très faible : < 3,0 mmol/l
- Faible : 3,0 - 3,9 mmol/l
- Dans la plage : 3,9 - 10,0 mmol/l
- Élevé : 10,00 - 13,9 mmol/l
- Très élevé : > 13,9 mmol/l

Ce rapport comporte deux sections :

Durée dans la plage


Représente le pourcentage global du temps passé dans les plages de glucose prédéfinies en fonction de la plage de dates sélectionnée.

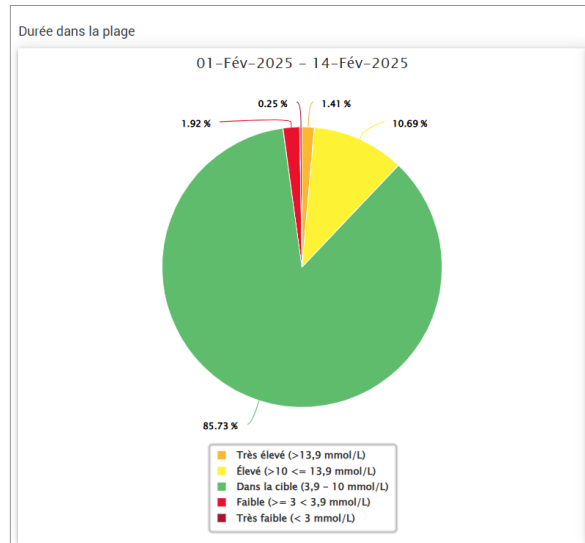

Durée de conservation dans la plage par heure de la journée

Cette section du rapport divise le graphique global de Durée dans la plage en différentes heures de la journée segmentées. Vous pouvez visualiser vos données en segments de 4 heures, 6 heures ou 8 heures. Sélectionnez pour cela une option en haut à droite du rapport.

Chaque segment affiche un pourcentage de temps pendant lequel votre taux de glucose était sur les mêmes segments Très faible, Faible, Sur la plage, Élevé et Très élevé.


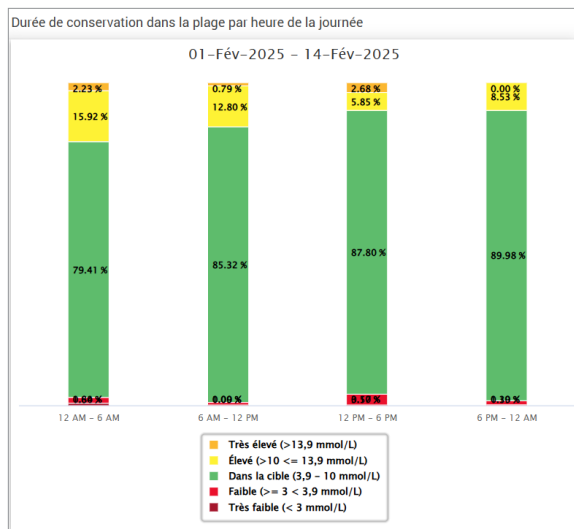


Rapport de variabilité du glucose

Le Rapport de variabilité du glucose affiche des informations de deux manières :

Graphe de tendance :

- Affiche un résumé des valeurs du taux de glucose sur une période de 24 heures.
- Comprend des données sur plusieurs jours, rassemblées sur un même graphe.
- Montre les valeurs du taux de glucose maximum, minimum et moyenne sur chaque heure.
- Donne un récapitulatif visuel des variations de votre taux de glucose sur la journée.

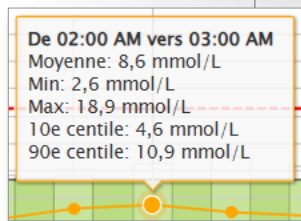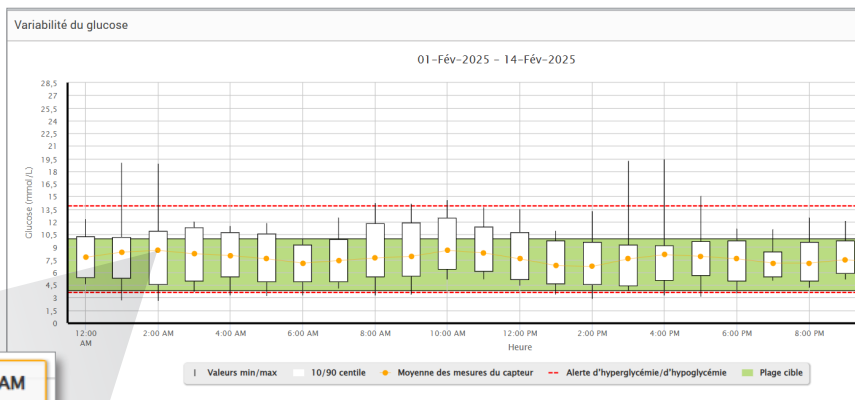

Remarque : placez votre curseur au-dessus d'une valeur moyenne du taux de glucose capteur pour faire apparaître les détails sur ces valeurs pendant l'heure concernée.

Tableau :

- Structure les données du taux de glucose par tranches de 4 heures.
- Fournit une analyse statistique détaillée pour chacune des périodes.
- Comprend un pourcentage de valeurs qui sont dans la plage cible, au-dessus de celle-ci ou en dessous de celle-ci.
- Donne le détail des quantités d'insuline et de glucides entrées sur chacune des périodes.

| Glucose | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GLUCOSE | 00:00-04:00 | 04:00-08:00 | 08:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 20:00-00:00 | TOTAL |
| % en dessous de l'alerte d'hyperglycémie | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% |
| % au-dessus de l'alerte d'hyperglycémie | 1% | -- | 1% | 2% | 2% | -- | 1% |
| Nombre de valeurs en dessous de l'alerte d'hyperglycémie | 8 | 7 | 4 | 9 | 14 | 5 | 47 |
| Nombre de valeurs au-dessus de l'alerte d'hyperglycémie | 21 | -- | 8 | 12 | 15 | -- | 56 |
| % dans la cible | 81% | 85% | 81% | 89% | 88% | 90% | 85% |
| % en dessous de la cible | 2% | 2% | 1% | 2% | 5% | 1% | 2% |
| % au-dessus de la cible | 17% | 13% | 18% | 9% | 8% | 9% | 13% |
| Taux de glucose moyen | 8,3 mmol/L | 7,5 mmol/L | 8,2 mmol/L | 7,2 mmol/L | 7,7 mmol/L | 7,4 mmol/L | 7,7 mmol/L |
| Taux de glucose le plus faible | 2,6 mmol/L | 3,2 mmol/L | 3,3 mmol/L | 2,9 mmol/L | 3,1 mmol/L | 2,7 mmol/L | 2,6 mmol/L |
| Taux de glucose le plus élevé | 19 mmol/L | 12,5 mmol/L | 14,5 mmol/L | 19,2 mmol/L | 19,4 mmol/L | 13,3 mmol/L | 19,4 mmol/L |
| Écart type | 2,6 mmol/L | 2 mmol/L | 2,3 mmol/L | 2,3 mmol/L | 2,2 mmol/L | 1,8 mmol/L | 2,2 mmol/L |
| Nombre de valeurs dans la plage 10-90 centiles | 504 | 537 | 539 | 545 | 540 | 545 | 3.189 |
| Nombre total de valeurs du taux de glucose | 624 | 654 | 672 | 672 | 672 | 672 | 3.966 |
| Nombre de jours avec une valeur au moins | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nombre moyen de valeurs par jour | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 283 |

Remarque : si vous rencontrez des problèmes pour afficher le rapport, essayez de limiter votre plage de dates. Si la quantité de données est anormalement grande, le rapport peut ne pas fonctionner.

Lancer le rapport

1. Sélectionnez **Rapports > Variabilité du glucose**

La plage de dates qui s'affiche sera la dernière semaine de données entrées ou téléchargées.

2. Sélectionnez la plage de dates

Remarque : pour changer la plage de dates du rapport, suivez les *instructions pour configurer la plage de dates* précédemment données dans la section *Tableau de bord* de ce Guide de l'utilisateur.

Rapport de tendance du taux de glucose

Rapport de tendance du taux de glucose :


- Affiche toutes les valeurs du taux de glucose sur une période de 24 heures.
- Affiche plusieurs jours de données rassemblées sur un même graphe.
- Permet d'identifier facilement la variabilité sur plusieurs jours de la semaine.

Lancer le rapport

1. Sélectionnez **Rapports > Tendance des taux de glucose**
2. Sélectionnez la plage de dates

Affichage du rapport

Les points qui apparaissent dans le rapport sont codés par couleurs, chaque couleur correspondant à un jour de la semaine. Vous pouvez utiliser le filtre de rapport pour choisir le ou les jours à afficher sur le graphe.

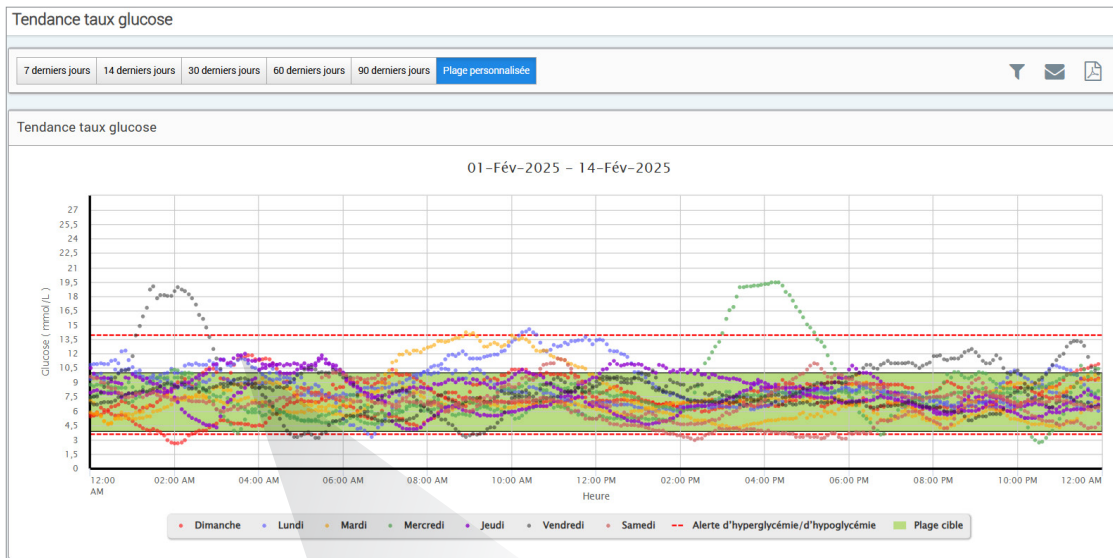

Valeurs glycémiques du capteur
11,8 mmol/L
13-Fév-2025 3:35:00 am
Jeudi

Remarque : placez votre curseur au-dessus d'une valeur du taux de glucose capteur spécifique pour afficher les détails concernant cette valeur.

Rapport d'historique des taux de glucose



Le rapport Historique taux glucose affiche un historique des valeurs MGC et des valeurs entrées manuellement sous forme d'un graphe de tendance. Le rapport Historique taux glucose offre un moyen efficace de surveiller les valeurs glycémiques du capteur et les étalonnages du système.

Lancer le rapport

1. Sélectionnez **Rapports > Rapport d'historique des taux de glucose**
2. Sélectionnez la plage de dates

Affichage du rapport

Chaque point de donnée est une valeur glycémique du capteur. Les événements qui ont été entrés dans l'application mobile sont affichés dans le rapport à l'heure à laquelle ils ont été entrés. Si vous sélectionnez une plage de dates de plus de 30 jours, des événements comme les repas ou les quantités d'insuline ne s'affichent pas.

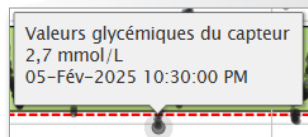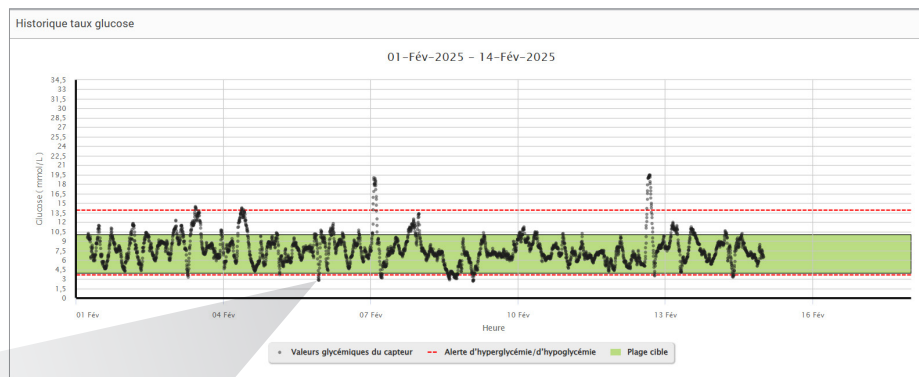

Remarque : placez votre curseur au-dessus d'une valeur du taux de glucose capteur spécifique pour afficher les détails concernant cette valeur. Vous pouvez aussi placer votre curseur sur une icône d'événement pour afficher les détails concernant cet événement.

Rapport de glucose quotidien

Le rapport quotidien de taux de glucose affiche les valeurs du taux de glucose sur une période de 24 heures pour plusieurs jours de suite.

Le rapport de glucose quotidien :

- A une plage cible du glucose fixe de 3,9 - 10,0 mmol/l.
- Affiche les niveaux d'alerte d'hypoglycémie et d'hyperglycémie (lignes rouges) que vous avez définis dans votre système MGC.
- Affiche des statistiques importantes pour chaque journée en fonction des paramètres d'alerte et de cible du glucose.
- Propose une option permettant d'afficher des icônes d'événements sur le graphe de tendance, et de développer un tableau des événements pour chaque journée.

Lancer le rapport

1. Sélectionnez **Rapports > Rapports de glucose quotidiens**
2. Sélectionnez la plage de dates

Rapport de distribution du glucose

Le rapport de distribution du glucose :


- Structure les valeurs du taux de glucose recueillies selon vos plages de cibles et d'alertes et affiche les données sous forme de diagramme circulaire.
- Affiche un diagramme circulaire pour la période en cours et pour les périodes précédentes.
- Les plages cibles se règlent sous Paramètres du glucose.
- Permet de représenter visuellement le nombre de valeurs qui sont dans la plage cible sur une plage de dates prédéfinie sélectionnée et les variations au cours du temps.

Lancer le rapport

1. Sélectionnez **Rapports > Rapport de distribution du glucose**
2. Sélectionnez la plage de dates

Affichage du rapport

Le rapport de distribution du glucose affiche deux diagrammes circulaires pour la plage de dates que vous avez sélectionnée. Il montre le jeu de données actuel et précédent de la plage de dates sélectionnée. Ces données vous permettent de comparer visuellement les valeurs actuelles et les anciennes valeurs pour la prise en charge de votre diabète.

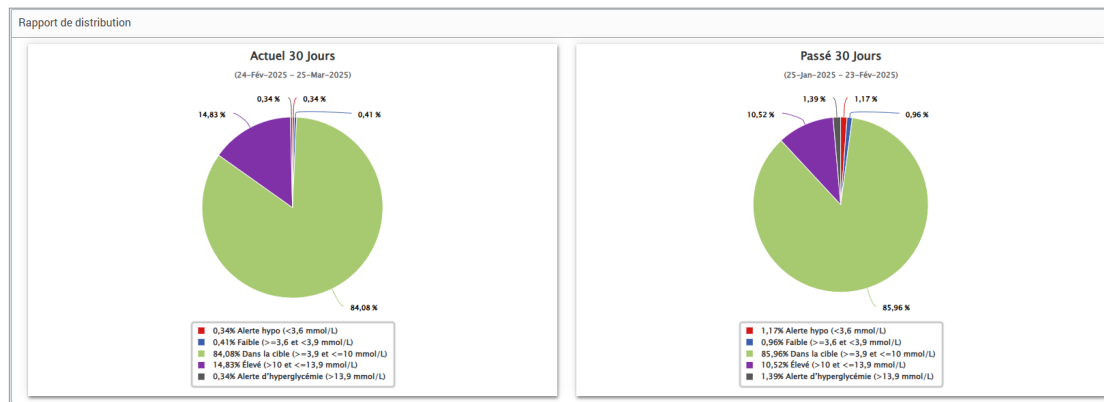

Rapport du journal du transmetteur

Le Rapport du journal du transmetteur propose un examen complet des données sur la plage de dates sélectionnée.

Le Rapport du journal du transmetteur présente trois tableaux distincts :

- **Glycémie** : affiche une liste de tous les événements de glycémie et associés entrés manuellement par ordre chronologique.
- **Entrées d'événements** : affiche les événements patient entrés depuis l'application mobile Eversense.
- **Taux de glucose capteur** : affiche les valeurs du taux de glucose relevées par le capteur.

Lancer le rapport

1. Sélectionnez **Rapports > Journal du transmetteur**








2. Sélectionnez la plage de dates

Affichage du rapport

Les événements s'affichent avec des informations sur la date, l'heure et :




- **Glycémie** : valeur du taux de glucose, unité, étalonnage
- **Entrées d'événements** : type d'événement, sous-type d'événement, valeur
- **Taux de glucose capteur** : valeur du taux de glucose, unité, ID du capteur

Les événements peuvent être triés par ordre ascendant ou descendant en cliquant sur le titre de la colonne correspondant. Le nombre d'entrées est indiqué en bas de chaque journal.

| DATE | HEURE | GLYCÉMIE | UNITÉ | ÉTALONNAGE |
|-------------|----------|----------|--------|---|
| 19-Mar-2025 | 03:14 PM | 6.8 | mmol/L |  |
| 19-Mar-2025 | 02:41 PM | 5.5 | mmol/L |  |
| 19-Mar-2025 | 02:31 PM | 5.5 | mmol/L |  |
| 19-Mar-2025 | 02:31 PM | 5.5 | mmol/L |  |
| 19-Mar-2025 | 01:48 PM | 5.5 | mmol/L |  |
| 19-Mar-2025 | 12:41 PM | 5.3 | mmol/L |  |
| 19-Mar-2025 | 12:25 PM | 5.5 | mmol/L |  |

Un symbole sous la colonne « **Étalonnage** » du tableau Glycémie indique si une valeur du taux de glucose a été

 Utilisée pour l'étalonnage,  Non utilisée ou  Manuelle.

-  **Utilisé** : une valeur de glycémie que vous avez entrée comme étalonnage et qui est acceptée par le système.
-  **Non utilisé** : un étalonnage que vous entrez et qui est supérieur à 22,2 mmol/l ou inférieur à 2,2 mmol/l.
-  **Manuel** : un événement de glycémie qui n'a pas été entré comme étalonnage.

« **Historique de l'appareil** » permet d'indiquer quand le capteur a été inséré, ainsi que la date de début d'étalonnage.

Exportation de données

Depuis la page Rapport du journal du transmetteur, vous pouvez également exporter les données au format .xlsx.

1. Sélectionnez **Rapports > Journal du transmetteur**

2. Sélectionnez « **Tout exporter** » en haut de la page pour exporter toutes les données du Journal du transmetteur au format .xlsx (feuille de calcul Excel)

Journal du transmetteur

7 derniers jours 14 derniers jours 30 derniers jours **60 derniers jours** 90 derniers jours Plage personnalisée

Historique de l'appareil **Tout exporter**

Paramètres

Glucose

Les paramètres du glucose vous permettent de personnaliser les niveaux de vos cibles et alertes du taux de glucose. Ce paramètre affecte la manière dont le glucose et d'autres données d'événements sont structurés et affichés dans les rapports. Lorsque vous synchronisez vos données sans fil via la fonction Partager mes données de l'application mobile, les paramètres du glucose que vous avez téléchargés sur votre application seront aussi synchronisés dans votre compte DMS.

Remarque :

- Les paramètres du glucose : NE sont PAS synchronisés lors du chargement de données depuis le Smart Transmetteur via le câble USB avec l'application Client Eversense.
- Changer les paramètres dans le DMS NE changera PAS les paramètres que vous avez entrés dans l'application mobile Eversense. Vous ne pouvez changer les paramètres qu'à partir de votre système MGC Eversense directement sur l'application mobile MGC Eversense.

Unité de mesure mg/dL mmol/L

Plage cible (doit être comprise dans les paramètres d'alerte)

| | | | |
|----------------------|---|-----|---|
| Cible hyperglycémie* | - | 10 | + |
| Cible hypo* | - | 3,9 | + |

Plage des seuils d'alerte (doit être comprise entre 3,1 et 19,4 mmol/L)

| | | | |
|-------------------------|---|------|---|
| Alerte d'hyperglycémie* | - | 13,9 | + |
| Alerte hypo* | - | 3,6 | + |

Remarque:
Eversense E3: L'Alerte Hypo peut être définie au plus bas à 3,3 mmol/L
Eversense 365: L'Alerte Hypo peut être définie au plus bas à 3,1 mmol/L

Pour changer les paramètres de votre compte DMS Eversense, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez Paramètres > Glucose

2. Cliquez sur le bouton mg/dl ou mmol/l sous les Unités de mesure pour sélectionner l'unité de mesure souhaitée pour les données de glucose

Si vous changez l'unité de mesure, les valeurs de la plage de glucose et de plage des seuils d'alerte changent en conséquence.

3. Cliquez sur les boutons -/+ à droite de Cible hyper et Cible Hypo pour régler les limites haute et basse de votre Plage cible de glucose

4. Recommencez pour la Plage des seuils d'alerte de glucose

5. Une fois les modifications terminées, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder vos modifications

Remarque : les paramètres du DMS Eversense n'affectent pas les paramètres du système MGC Eversense et n'ont d'effet que sur la manière dont les données sont structurées et affichées dans le DMS Eversense.

Rapport récapitulatif

Les Paramètres du rapport récapitulatif vous permettent de configurer un rapport automatique planifié régulièrement à recevoir par e-mail. Vous pouvez sélectionner à quelle fréquence vous recevrez les rapports et quels rapports recevoir.

Remarque :

- Vous recevrez les rapports sous forme de fichiers PDF joints à l'e-mail.
- L'e-mail sera envoyé à l'adresse électronique utilisée pour créer votre compte Eversense.

Paramètres de rapport récapitulatif

Détails du programme

Oui, je souhaite recevoir des rapports

Signaler une occurrence

Langue favorite

Sélectionner le rapport à imprimer :

Rapport AGP

Durée dans la plage

Durée dans la cible

Rapport de distribution

Tendance taux glucose

Variabilité du glucose

Historique taux glucose

Durée de conservation dans la plage par heure de la journée 4 heures 6 heures 8 heures

Réinitialiser Enregistrer

Pour changer les paramètres de votre compte DMS Eversense, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez **Paramètres > Rapport récapitulatif**

2. Cliquez sur la case à côté de « **Oui, je souhaite recevoir des rapports** » pour la cocher

3. Choisissez à quelle fréquence vous voulez recevoir le rapport par e-mail

- **Une fois par semaine** : vous recevrez le rapport chaque dimanche. Les rapports afficheront les données que votre système MGC Eversense a calculées pendant la semaine précédente.
- **Une semaine sur deux** : vous recevrez le rapport un dimanche sur deux. Les rapports afficheront les données que votre système MGC Eversense a calculées pendant les 2 semaines précédentes.
- **Une fois par mois** : vous recevrez le rapport le premier jour de chaque mois. Les rapports afficheront les données que votre système MGC Eversense a calculées pendant le mois précédent.

4. Sélectionnez la langue d'affichage des rapports

5. Sélectionnez les rapports à recevoir

Remarque :

- Si vous sélectionnez le rapport *Durée* dans la plage, vous devrez également sélectionner le paramètre *Heure* de la journée. Pour plus d'informations sur le rapport *Durée* de conservation des valeurs dans la plage par heure de la journée, voir *Rapports*.
- Le rapport de glucose quotidien n'est pas une sélection disponible pour le rapport récapitulatif.

6. Cliquez sur « Enregistrer »

Une fois ce paramètre enregistré, vous recevrez votre premier e-mail le premier jour du cycle suivant. Si vous sélectionnez *Une fois par semaine* ou *Une semaine sur deux*, vous recevrez votre premier rapport le dimanche suivant. Si vous sélectionnez *Une fois par mois*, vous recevrez votre premier rapport le premier jour du mois suivant.

Pour ne plus recevoir les e-mails de Rapport récapitulatif :

1. Sélectionnez **Paramètres > Rapport récapitulatif**

2. Cliquez sur la case à côté de « **Oui, je souhaite recevoir des rapports** » pour la décocher

3. Cliquez sur « **Enregistrer** » en bas de la page

Remarque : si vous n'avez synchronisé aucune donnée dans votre compte Eversense depuis votre système MGC Eversense pour une période de rapport complète, vous recevrez une notification par e-mail indiquant que vous ne recevrez plus d'e-mails tant que les données ne sont pas synchronisées avec votre compte.

Transmetteur

Télécharger les données de l'appareil

Il existe deux manières de télécharger les données de l'appareil vers votre compte DMS Eversense.

1. Si la **Synchronisation automatique** est activée dans l'application Eversense, vos données MGC seront chargées automatiquement dans votre compte DMS toutes les 5 minutes.

Conseil : une connexion Internet est nécessaire sur votre appareil mobile pour synchroniser vos données via l'application mobile Eversense.


Remarque : vous pouvez télécharger manuellement des données en sélectionnant « **Partager mes données** » dans l'application mobile Eversense et en touchant « **Lancer la synchronisation** » pour télécharger sans fil vos données MGC dans votre compte DMS.

2. Vous pouvez également charger les données du Smart Transmetteur via le câble USB fourni avec le système MGC Eversense. Pour charger les données du Smart Transmetteur avec le câble USB, vous devez commencer par télécharger et installer l'application Client Eversense.

Remarque : pendant la procédure de chargement, votre Smart Transmetteur ne recueillera pas de données depuis le capteur.

Pour télécharger et installer l'application Client Eversense :



1. Sélectionnez **Transmetteur** depuis le menu de navigation

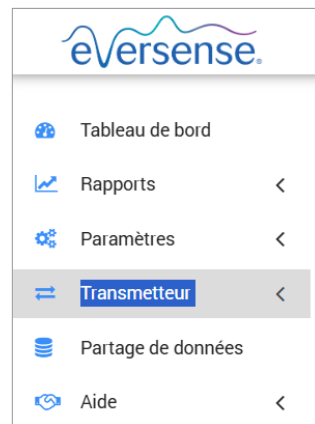

2. Cliquez sur **Télécharger pour PC** ou **Télécharger pour Mac**

Le bouton approprié apparaît en fonction du système informatique que vous utilisez.

Remarque : lorsque le téléchargement est terminé et qu'il a réussi, votre navigateur peut vous mettre en garde en disant que le logiciel d'installation n'est pas téléchargé de façon courante et qu'il pourrait être dangereux. Le DMS Eversense **ne contient pas** de logiciel ni de virus susceptible de nuire à votre ordinateur.

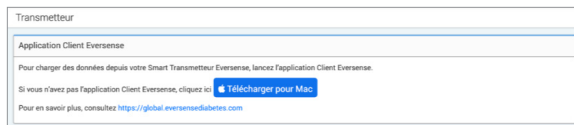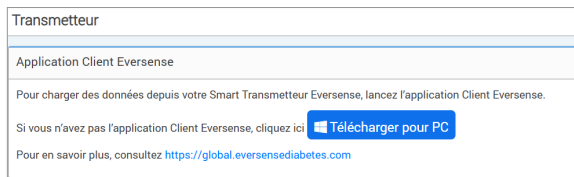

Pour télécharger l'application Client Eversense pour les utilisateurs de PC :


1. Exécutez le logiciel d'installation

Vous pouvez également cliquer sur « **Enregistrer** » pour enregistrer le logiciel sur votre ordinateur et l'installer ultérieurement. Lorsque vous exécutez le logiciel, suivez les invites de l'Assistant InstallShield.

Pour les utilisateurs de Chrome :








Pour les utilisateurs d'autres navigateurs :

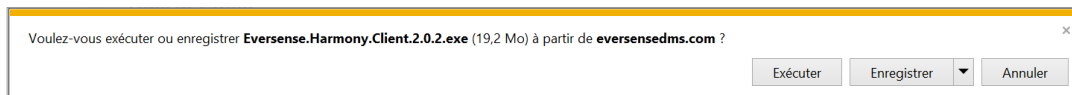


Remarque : l'application Client Eversense est téléchargée directement depuis le DMS Eversense. Une fenêtre peut apparaître pour demander si vous voulez installer cette application car elle n'est pas téléchargée depuis le Microsoft store. Cliquez sur « **Exécuter quand même** » pour poursuivre l'installation.

2. Cliquez dans les options par défaut pour installer le logiciel

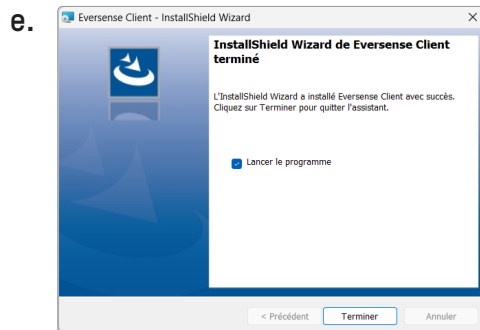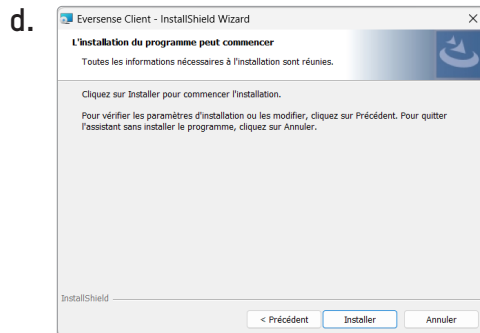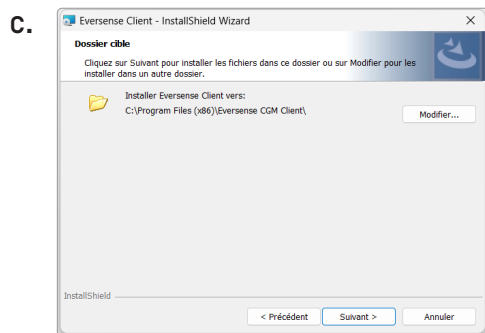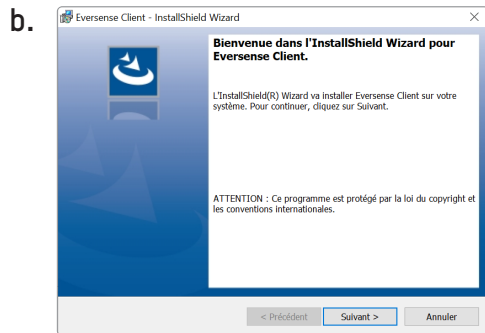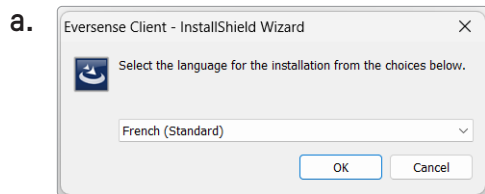


Pour télécharger l'application Client Eversense pour les utilisateurs de Mac :

1. Exécutez le logiciel d'installation.
2. Faites glisser l'icône du Client Eversense dans le dossier de l'application à l'écran.

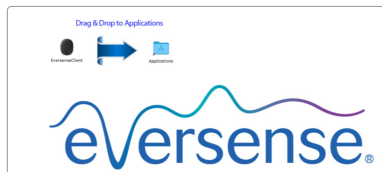

3. Ouvrez l'application Client Eversense dans le dossier Applications de votre Mac.

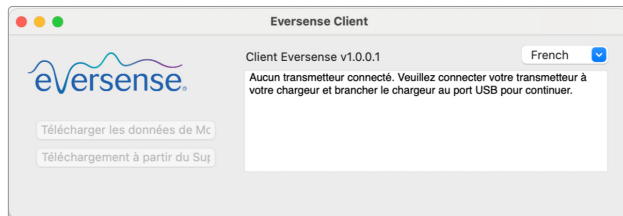


IMPORTANT : L'APPLICATION CLIENT EVERSENSE EST TÉLÉCHARGÉE DIRECTEMENT DEPUIS LE DMS EVERSENSE. LORSQUE VOUS ALLEZ OUVRIR L'APPLICATION, UNE FENÊTRE PEUT APPARAÎTRE POUR INDIQUER QU'APPLE NE PEUT PAS OUVRIR CETTE APPLICATION. L'APPLICATION CLIENT EVERSENSE NE CONTIENT AUCUN MALICIEL.

Pour ouvrir l'application, vous devrez :

1. Accéder à **Préférences système > Sécurité et confidentialité**
2. Cliquer sur « **Ouvrir quand même** » à côté de « **L'utilisation du Client Eversense est bloquée car il ne provient pas d'un développeur identifié** »
3. Cliquer sur « **Ouvrir** » dans la fenêtre contextuelle suivante

Pour télécharger des données du Smart Transmetteur sur votre compte DMS :

1. Lancez l'application Client Eversense en ouvrant le « menu Démarrer » de votre ordinateur et en recherchant des programmes « Ajoutés récemment » ou en recherchant « Eversense ».

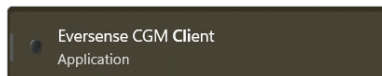


2. Cliquez pour ouvrir le dossier « Client MGC Eversense ».

3. Cliquez sur « Télécharger les données de mon transmetteur » puis entrez l'e-mail que vous avez utilisé pour créer votre compte et votre mot de passe.

Connectez votre Smart Transmetteur sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.



Conseil : pour que les utilisateurs de PC lancent rapidement le programme à l'aide de systèmes d'exploitation Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'**icône du Client Eversense** et épinglez-la dans la **barre de tâches** ou le menu **Démarrer**.

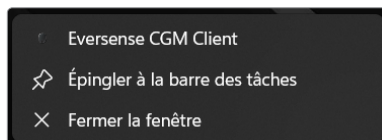

4. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur « Télécharger » pour commencer à charger les données de votre Smart Transmetteur sur votre compte.

■ Télécharger les données de Mon transmetteur

Pour charger les données de votre transmetteur sur votre compte DMS Eversense, veuillez entrer votre adresse e-mail et votre mot de passe. Après avoir réussi à charger vos données, visitez <https://ouspilot.eversensedms.com> pour vous connecter et afficher vos données.


E-mail

Mot de passe


Télécharger



5. Cliquez sur « OK » pour continuer.

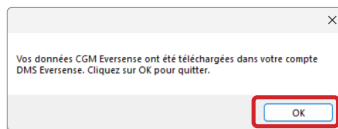

(PC)

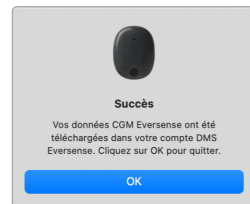

(Mac)

Remarque : lorsque vous contactez le Support clientèle pour obtenir une assistance technique, il peut vous être demandé de télécharger le journal de diagnostic. Il sera utilisé pour envoyer un fichier journal de diagnostic de votre Smart Transmetteur au Support clientèle. Cette fonction ne sera utilisée que pour le dépannage avancé avec l'aide du Support clientèle.



Partage de données


Vous pouvez connecter votre compte DMS Eversense au compte clinique DMS Pro Eversense de votre professionnel de santé. Le personnel de la clinique pourra ainsi consulter vos données et vos rapports de glucose.

Vous aurez besoin de l'ID clinique DMS Pro de votre clinique. Contactez votre clinique si vous ne le connaissez pas.


Partage de données avec votre clinique

Pour associer votre compte DMS Eversense au compte DMS Pro Eversense de votre clinique :

1. Depuis le menu de navigation, choisissez **Partage de données**.

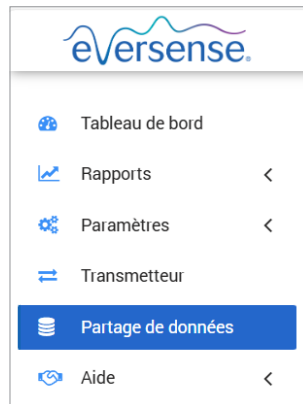

2. Dans la case en regard de « **No de la clinique** », saisissez l'ID clinique DMS Pro Eversense de votre clinique, et choisissez la clinique dans le menu déroulant. Cliquez sur « **Sélectionner** ».

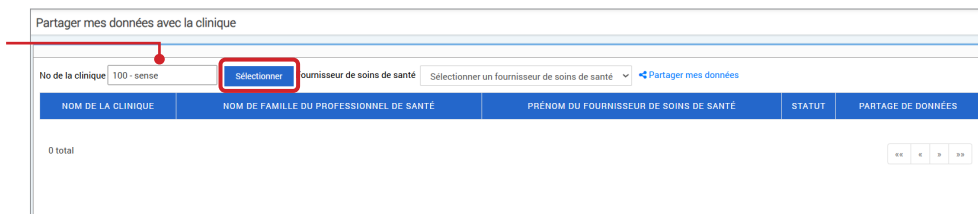

The image shows a web form titled 'Partager mes données avec la clinique'. At the top, there is a search bar with the text 'No de la clinique' and the value '100 - sense'. To the right of the search bar is a red-bordered button labeled 'Sélectionner'. Below the search bar is a dropdown menu with the text 'Sélectionner un fournisseur de soins de santé'. Below the dropdown menu is a blue button labeled 'Partager mes données'. Below the form is a table with the following columns: 'NOM DE LA CLINIQUE', 'NOM DE FAMILLE DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ', 'PRÉNOM DU FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ', 'STATUT', and 'PARTAGE DE DONNÉES'. Below the table, it says '0 total' and there are pagination controls.

3. Sélectionnez votre fournisseur de soins de santé depuis la liste déroulante.

4. Cliquez sur le lien « **Partager mes données** ». Votre clinique et votre fournisseur de soins de santé apparaîtront désormais dans votre liste de partage de données.

L'état de la clinique apparaît comme **En attente**. Une fois que la clinique accepte votre invitation, l'état passe sur **Accepté**.

Partager mes données avec la clinique

La demande de partage de données a bien été envoyée

No de la clinique: 12 - PROhealthcare1 [Sélectionner](#) Fournisseur de soins de santé: Clinic, Staff,, DO [Partager mes données](#)

| NOM DE LA CLINIQUE | NOM DE FAMILLE DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ | PRÉNOM DU FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ | STATUT | PARTAGE DE DONNÉES |
|--------------------|--|---|------------|-------------------------|
| PROhealthcare1 | Staff | Clinic | En attente | Annuler |

1 total

« « 1 » »

No de la clinique: [Sélectionner](#) Fournisseur de soins de santé: Sélectionner un fournisseur de soins de santé [Partager mes données](#)

| NOM DE LA CLINIQUE | NOM DE FAMILLE DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ | PRÉNOM DU FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ | STATUT | PARTAGE DE DONNÉES |
|--------------------|--|---|---------|-------------------------|
| High Street Clinic | Johnson | Jon | Accepté | Arrêter |

1 total

« « 1 » »

Accepter une invitation de partage de données de votre clinique

Si votre professionnel de santé vous invite à partager vos données à l'aide de son compte clinique DMS Pro :

- Depuis votre compte DMS Eversense : sélectionnez **Partage de données** dans le menu de navigation de gauche, cherchez le nom de la clinique, et acceptez ou refusez l'invitation.

Suppression de votre clinique

- Depuis votre compte DMS : Sélectionnez **Partage de données** dans le menu de navigation de gauche, et sélectionnez « **Arrêter** » ou « **Annuler** » en regard du nom de la clinique.

Aide

À propos

Cette page présente les dernières versions du DMS et de l'application Client Eversense.

Nous contacter

Coordonnées du Support clientèle.

| |
|--|
| Contact |
| Contactez-nous |
| Pour joindre le service à la clientèle, veuillez contacter votre distributeur local. Pour consulter la liste des distributeurs Eversense, veuillez visiter https://global.eversensediatetes.com/distributors |

IMPORTANT : pour toute question sur votre système DMS Eversense, veuillez contacter votre distributeur local.

Désactiver Mon compte

IMPORTANT : si vous désactivez votre compte DMS Eversense, votre compte se désactivera sur TOUS les produits Eversense.


Désactiver le compte

Désactiver Mon compte

* Champ obligatoire

Veillez soumettre le formulaire ci-dessous pour désactiver votre compte.

Raison *

Mot de passe * 

Question de sécurité

Réponse *

Notes de version

Résumé des dernières mises à jour du logiciel DMS Eversense.

Remarque : lorsqu'une mise à jour est réalisée dans le logiciel DMS Eversense, une bannière apparaît en haut des pages du site. Cliquez sur la bannière pour voir la liste des mises à jour.

22. Eversense NOW

Surveillance à distance avec le système MGC et l'application Eversense NOW

L'application Eversense intègre une option de suivi à distance. Cette fonctionnalité permet de visualiser les valeurs MGC Eversense sur un second écran via l'application mobile Eversense NOW.

Utilisation prévue

L'application Eversense NOW est conçue pour servir d'affichage secondaire des valeurs du taux de glucose et alertes connexes provenant d'utilisateurs d'un système MGC Eversense.

Contre-indications

Suivez les directives cliniques et celles de votre établissement pour l'usage de votre appareil mobile en présence de machines d'IRM, de scanners CT et d'autres appareils utilisés dans des procédures médicales.

Risques

Parfois, il n'est pas possible d'envoyer les valeurs du taux de glucose sur l'application Eversense NOW. Si vous ne recevez pas de valeurs du taux de glucose d'un utilisateur MGC Eversense, vous ne serez pas en mesure de l'assister en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. La fonction de surveillance à distance fournit un affichage secondaire des données. Ce n'est pas un système de surveillance en temps réel.

Les utilisateurs MGC Eversense n'ont pas forcément accès à une connexion permettant le transfert des données, comme l'Internet/le wifi ou le 3G/4G/LTE. Si un utilisateur MGC Eversense ou vous-même ne disposez pas d'une connexion Internet, vous ne pourrez pas visualiser les taux de glucose mesurés. Tout problème survenant sur les appareils mobiles, l'Internet sans fil, la connexion pour transmettre les données ou le système de gestion des données (DMS) Eversense peut entraîner un dysfonctionnement de l'affichage des données. Il en est de même si le Smart Transmetteur de l'utilisateur MGC n'est pas à portée du réseau de son appareil mobile ou est en cours de charge. L'utilisateur Eversense ne doit pas compter sur vous pour surveiller son taux de glucose pour l'assister en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie. Vous trouverez des informations supplémentaires relatives à la sécurité à la page <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

Avantages

Utilisé avec l'application de suivi à distance Eversense NOW, le système MGC Eversense donne aux utilisateurs un niveau de confiance supplémentaire, puisque des tiers peuvent à présent voir leurs taux de glucose.

Avertissements :

- **Les taux de glucose qui s'affichent sur l'application Eversense NOW ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions thérapeutiques. L'application Eversense NOW est un affichage secondaire des données MGC Eversense ; il ne remplace pas l'affichage principal. Les utilisateurs d'un système MGC doivent toujours utiliser les valeurs de glycémie obtenues au moyen d'un lecteur pour prendre leurs décisions thérapeutiques. Utiliser une valeur du taux de glucose capteur pour prendre une décision thérapeutique pourrait entraîner une hyperglycémie ou une hypoglycémie.**
- **Les utilisateurs du MGC Eversense ne doivent pas compter sur les personnes qui surveillent leurs valeurs du taux de glucose à distance pour les prévenir en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie.**

Mises en garde :

- L'application mobile distante Eversense NOW ne remplace pas le régime de surveillance prescrit par votre professionnel de santé.
- Si un utilisateur MGC Eversense n'a pas activé la synchronisation automatique (la fonction qui permet d'envoyer automatiquement des données vers l'application Eversense NOW), vous pourriez avoir des difficultés à visualiser les tendances et événements d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie.
- Si vos utilisateurs MGC Eversense ne disposent pas d'une connexion Internet ou si l'appareil mobile de l'un d'eux s'est éteint par manque de charge, leurs données MGC Eversense ne s'affichent pas dans l'application Eversense NOW.
- Si vous coupez le son de votre appareil mobile, vous ne recevrez pas d'alertes sonores relatives aux données MGC que vous surveillez à distance sur votre application Eversense NOW.
- Si un utilisateur MGC se paramètre sur « Hors-ligne », vous ne recevrez pas d'alertes relatives aux données MGC que vous surveillez à distance sur votre application Eversense NOW.
- L'application Eversense NOW ne communique pas directement avec le capteur Eversense ni avec le Smart Transmetteur Eversense.
- L'application Eversense NOW ne peut pas modifier le paramétrage de l'application MGC Eversense.
- Si vous n'autorisez pas les notifications à partir de l'application Eversense NOW, vous ne recevrez pas les alertes relatives au taux de glucose émises par les utilisateurs MGC Eversense.
- Si votre appareil mobile est réglé sur « Ne pas déranger », vous n'entendrez pas les notifications provenant de l'application Eversense NOW.

Utiliser l'application Eversense NOW

Cette section vous explique comment utiliser l'application Eversense NOW pour surveiller les taux de glucose des utilisateurs d'un système MGC Eversense.

Merci d'avoir téléchargé l'application mobile Eversense NOW. Eversense NOW vous permet de surveiller à distance les taux de glucose des utilisateurs d'un système MGC Eversense.

Mise en garde : l'application de suivi du glucose à distance Eversense NOW ne remplace pas l'affichage principal sur l'application du système MGC Eversense ni le suivi indiqué par un professionnel de santé.

Configuration du système

- L'application Eversense NOW téléchargée sur votre appareil mobile à partir de l'App Store d'Apple®.
- Un Apple® iPhone® ou iPod® ou iPad® ou un appareil Android compatible.
- Vous trouverez une liste d'appareils et de systèmes d'exploitation compatibles à la page global.eversenseddiabetes.com/compatibility.

Remarque : pour télécharger l'application et recevoir les valeurs du taux de glucose pour qu'elles s'affichent sur votre application Eversense NOW, il vous faut une connexion Internet. Si l'utilisateur MGC Eversense a désactivé la synchronisation automatique, aucune valeur du taux de glucose ne s'affichera sur votre application Eversense NOW.

Licence d'exploitation pour l'utilisateur final et politique de confidentialité

L'usage de l'application Eversense NOW est sujet aux termes et conditions de la dernière licence d'exploitation pour l'utilisateur final de l'application Eversense NOW et de sa Politique de confidentialité. Ces documents sont mis à jour périodiquement et sont disponibles sur global.eversensedibetes.com.

Appareils déplombés

N'utilisez PAS l'application Eversense NOW sur des iPhones, iPads ou iPods déplombés. Des appareils déplombés ne fournissent pas un niveau de sécurité et de précision acceptable pour l'utilisateur. Ils ne sont donc pas approuvés par Senseonics.

Aide et Support clientèle

Si vous ne comprenez pas quelque chose dans ce Guide de l'utilisateur, appelez votre distributeur local ; au besoin, allez à la page global.eversensedibetes.com pour le localiser.

Rejoindre le Cercle Eversense

Le Cercle Eversense fait référence à un groupe de personnes qui peuvent surveiller à distance les valeurs du taux de glucose d'un utilisateur MGC Eversense et les alertes qui s'y rapportent. Pour rejoindre le Cercle, il faudra accepter l'invitation qui vous est adressée par l'utilisateur MGC Eversense, créer un compte sur le site Web du DMS Eversense et télécharger l'application mobile Eversense NOW.

Télécharger l'application Eversense NOW

1. Accédez à l'Apple App Store ou au Google Play Store, et cherchez « Eversense NOW ».
2. Cliquez sur l'icône Eversense NOW, et téléchargez et installez l'application sur votre appareil.
3. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur « Autoriser » pour recevoir des alertes liées au glucose provenant des utilisateurs MGC Eversense de votre liste.



eversense now

LICENCE D'EXPLOITATION POUR L'UTILISATEUR FINAL

SENSONICS, INCORPORATED

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL (EUROPE)

Dernière mise à jour : jeudi 8 septembre 2022

IMPORTANT – VÉRIFIEZ D'ABORD ATTENTIVEMENT LES TERMES DE CE CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL (« CLUF »), CE CLUF ET VOTRE ACCORD CONTRACTUEL CONTRAIGNANT ENTRE VOUS ET SENSONICS, INCORPORATED (« SENSONICS ») ET S'APPLIQUENT À VOTRE UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT, DE L'APPLICATION MOBILE SENSONICS EVERSENSE, DU SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES EVERSENSE (DMS) DU LOGICIEL EVERSENSE DANS PRO, DE L'APPLICATION MOBILE EVERSENSE « NOW » ET/OU DE VOTRE LOGICIEL, OU APPLICATION DE SENSONICS Y COMPRIS TOUTES LES AMÉLIORATIONS, LES NOUVELLES VERSIONS ET LES MODIFICATIONS DES ÉLÉMENTS QUI PRÉSENTENT INDIVISIBILLEMENT ET COLLECTIVEMENT DESIGNÉS : « LES PRODUITS ET SERVICES DE SENSONICS » (« CE CLUF S'APPLIQUENT À VOTRE UTILISATION DES PRODUITS ET SERVICES DE SENSONICS DANS LE CADRE DES LOGS ET RÉGLAGES APPLICABLES EN EUROPE, CE CLUF NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE UE »).

| | | |
|---|--|--|
| LE TRAITEMENT VOTRE UTILISATEUR COMPRISE UN SYSTÈME DE SENSONICS | Autorisez-vous « Eversense NOW » à vous envoyer des notifications ? | NOTICE DE SENSONICS, Y COMPRIS VOTRE NOMME |
| EN INSTALLANT SENSONICS | Les notifications peuvent inclure des alertes, des sons et des pestilles d'icônes. Vous pouvez les configurer dans Réglages. | ET/OU VOTRE |
| CONDITIONS D'ACCORD EN (« ACCEPTER SENSONICS TOUTES LES) LE BOUTON AUTORISÉ À | <input type="button" value="Refuser"/> <input type="button" value="Autoriser"/> | ET/OU VOTRE |

LE FAIT DE CLIQUER/APPUYER SUR LE BOUTON « ACCEPTER » CONSTITUE VOTRE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE SUR CE CLUF ET INDIQUE VOTRE CONSENTEMENT À L'EXÉCUTION ÉLECTRONIQUE DE CE DERNIER. SI VOUS AVEZ DÉJÀ ACCEPTÉ LE CLUF PAR LE PASSÉ, EN CLIKANT À UTILISER LES PRODUITS ET SERVICES DE SENSONICS À LA SUITE DE MISES À JOUR DE MODIFICATIONS DANS/RENOUVELLEMENTS DE VOTRE CLUF, VOUS AVEZ DÉJÀ ACCEPTÉ VOS MISES À JOUR, SI VOUS AVEZ DÉJÀ ACCEPTÉ VOTRE UE PAR CE DERNIER. (2) DÉCLARÉ QUE VOUS AVEZ L'ÂGE LÉGAL POUR CONCLURE UN CONTRAT CONTRAIGNANT, ET (3) DÉCLARÉ QUE VOUS AVEZ LE POUVOIR DE CONCLURE CE CLUF PERSONNELLEMENT SEULES DES PERSONNES PERMETTANT DE CONCLURE LE PRÉSENT CLUF. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC TOUTS LES TERMES ET TOUTES LES CONDITIONS DE CE CLUF OU SI VOUS N'AVEZ PAS LE POUVOIR DE LE CONCLURE, VOUS NE DEVEZ PAS ACCEPTER OU VOUS NE DEVEZ PAS INSTALLER OU UTILISER DES PRODUITS ET SERVICES DE SENSONICS NI Y ACCÉDER.

En cliquant sur le bouton « Accepter » Je confirme avoir lu la Politique de confidentialité et accepte les conditions du Contrat de licence d'utilisateur final (CLUF).

Mise en garde : si vous n'autorisez pas les notifications à partir de l'application Eversense NOW, vous ne recevrez pas les alertes relatives au taux de glucose émises par les utilisateurs MGC Eversense.

IMPORTANT : N'AJOUTEZ PAS l'application à l'Espace privé ou à une fonctionnalité similaire de l'appareil mobile qui l'empêcherait d'émettre des notifications ou de communiquer avec le reste du système.

4. Créez un compte Eversense pour vous connecter à l'application.

Remarque : si vous avez déjà un compte Eversense, vous n'avez pas besoin d'en créer un nouveau pour utiliser Eversense NOW.

Remarque : à des fins de sécurité, si vous entrez un mot de passe incorrect trois fois de suite dans l'application mobile, votre compte sera bloqué pendant 30 minutes. Pendant ce temps, vous ne pourrez pas surveiller à distance les données des utilisateurs MGC Eversense.

5. Acceptez la licence d'exploitation pour l'utilisateur final.

6. Choisissez l'unité de mesure. L'unité de mesure que vous choisissez s'applique à tous les utilisateurs MGC Eversense dont vous pouvez voir les données. Une fois l'application installée, vous ne pouvez plus changer l'unité de mesure.

eversense now

Email
oliv****

Mot de passe

Créer un compte Mot de passe oublié

SE CONNECTER

Succéder le compte

eversense now

LICENCE D'EXPLOITATION POUR L'UTILISATEUR FINAL

SENEBIO, INCORPORÉE

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL (CLUF)

Après avoir cliqué sur le bouton « Accepter » dans l'application, vous acceptez les termes et conditions de ce contrat de licence d'utilisateur final (CLUF) et vous acceptez d'être enregistré en tant qu'utilisateur final (CLUF) et d'être enregistré en tant qu'utilisateur final (CLUF) et d'être enregistré en tant qu'utilisateur final (CLUF).

En cliquant sur le bouton « Accepter », je confirme avoir lu la Politique de confidentialité et accepte les conditions du Contrat de licence d'utilisateur final (CLUF).

Annuler Accepter

eversense now Terminer

UNITÉ DE MESURE

La valeur du taux de glucose a été réglé et apparaît dans l'unité de mesure indiquée ci-dessous.

Unité de mesure: mmol/L

Exemple : 8,9 mmol/L (ou entre 2,2 et 22,2 mmol/L)

mg/dL

mmol/L ✓


Si vous souhaitez passer à l'unité de mesure mg/dL, vous ne pouvez le faire qu'à ce stade. Pour changer l'unité de mesure, vous devez effacer l'application Eversense Now et la réinstaller.

Invitation dans le cercle

Le Cercle Eversense fait référence à un groupe de personnes qui peuvent et sont autorisées à surveiller à distance les valeurs du taux de glucose d'un utilisateur MGC Eversense et les alertes qui s'y rapportent. Pour rejoindre le Cercle, il faudra créer un compte et télécharger l'application mobile Eversense NOW.

Accepter ou refuser une invitation à rejoindre le Cercle Eversense





Un Cercle Eversense est un groupe de personnes qu'un utilisateur MGC Eversense a invitées pour qu'elles surveillent son taux de glucose et les alertes s'y rapportant. En tant que membre invité dans le Cercle, vous recevrez un e-mail d'invitation à rejoindre le Cercle. Vous aurez besoin de l'application Eversense NOW pour accepter l'invitation.

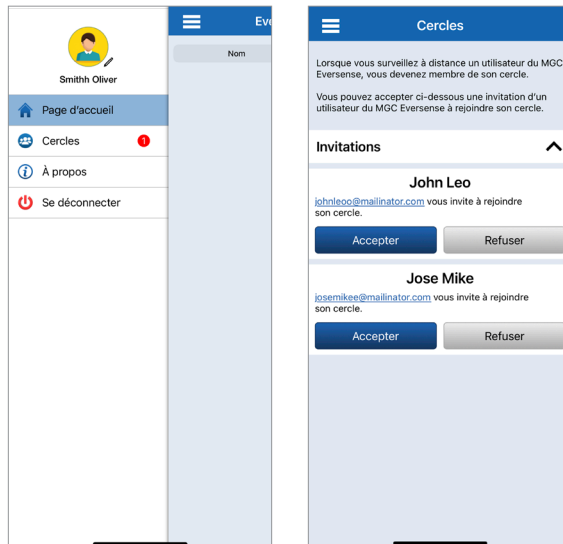

Vous pouvez gérer toutes les invitations en attente que vous avez reçues dans le menu Cercles. Vous pouvez **Accepter** ou **Refuser** chaque invitation en attente.



Pour accepter une invitation :

1. Sur le menu principal, cliquez sur « Cercles ».
2. Cliquez sur « Accepter ».
3. Cliquez sur « OK » pour confirmer.
4. Le nom et la photo de l'utilisateur du MGC Eversense apparaissent sur la page d'accueil.

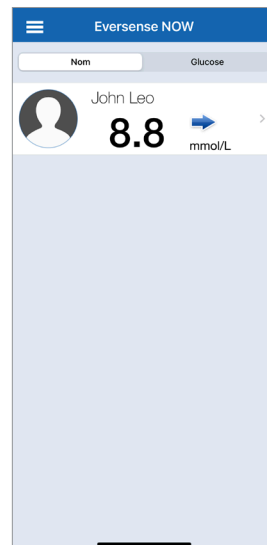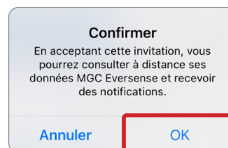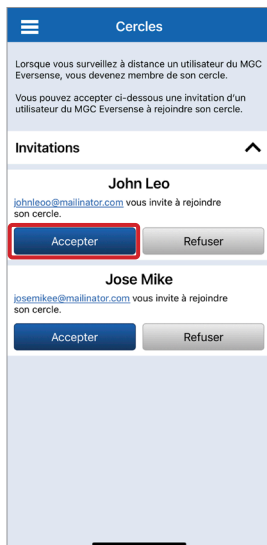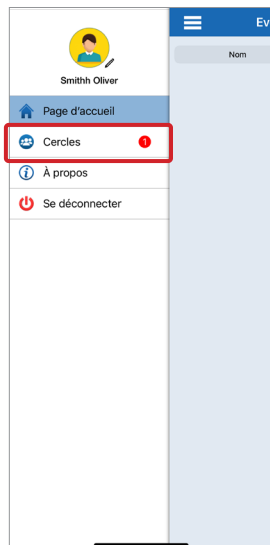

Pour refuser une invitation :

1. Cliquez sur « Refuser ».
2. Cliquez sur « OK » pour confirmer.
3. L'invitation disparaît de votre liste Invitations.

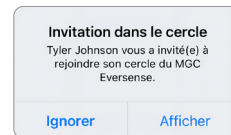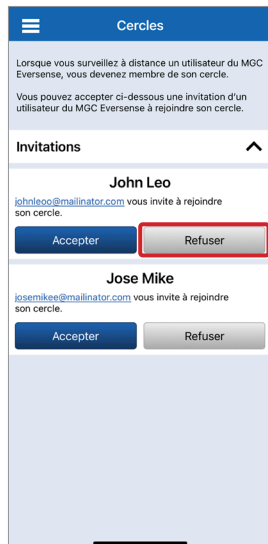

Si vous avez ouvert l'application Eversense NOW et que vous recevez une nouvelle invitation, une fenêtre de notification apparaît.

Pour supprimer un utilisateur MGC Eversense de votre liste

Si vous supprimez un utilisateur MGC Eversense de votre liste, vous ne pourrez plus surveiller son taux de glucose à distance. Pour réinscrire un utilisateur dans votre liste, contactez l'utilisateur MGC Eversense en question pour qu'il vous envoie une nouvelle invitation.

1. Balayez le nom de l'utilisateur du système MGC Eversense vers la gauche sur la page d'accueil.

2. Cliquez sur « Supprimer ».






Un avertissement vous invitera à confirmer que vous voulez supprimer l'utilisateur du MGC Eversense.

3. Cliquez sur « Oui » pour supprimer définitivement cette personne de votre liste.

Le nom de la personne supprimée disparaît alors de la page d'accueil.

Remarque : cela peut prendre jusqu'à 2 heures pour que l'utilisateur du MGC Eversense voie que vous n'êtes plus dans son Cercle dans son application de MGC Eversense.


Remarque : un utilisateur du MGC Eversense peut également vous supprimer de son Cercle. Dans ce cas, cette notification apparaît.

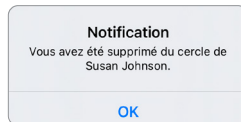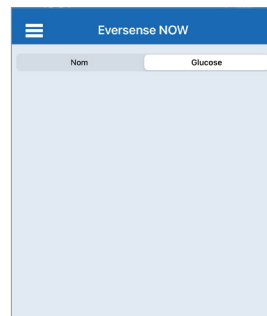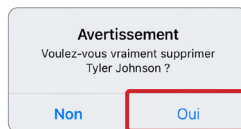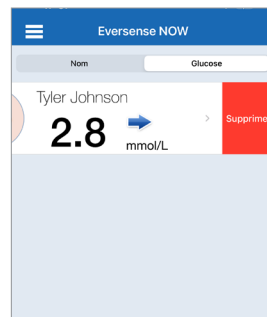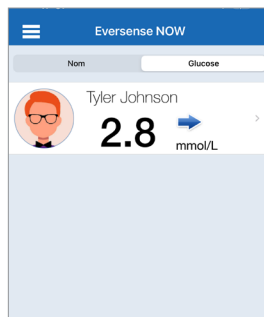


Menu principal

Le menu principal permet d'accéder à la page d'accueil de l'application Eversense NOW, à la page Cercles, à la page À propos et à la page de déconnexion.

Depuis le menu principal, vous pouvez accéder à la page d'accueil pour y voir votre liste d'utilisateurs du MGC Eversense, revoir les informations relatives à l'application Eversense NOW sur la page À propos, vous déconnecter de l'application ou ajouter une photo de profil.

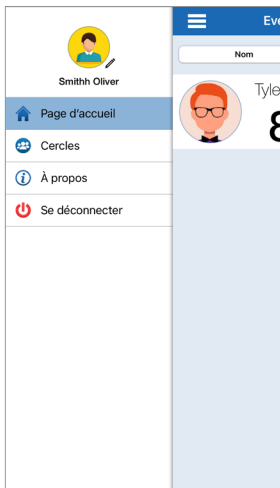


Pour accéder au menu principal, cliquez sur l'icône à 3 barres en haut à gauche de l'écran.

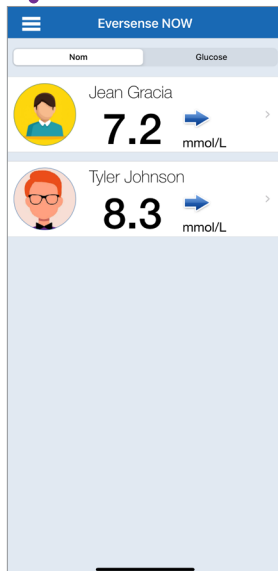

Page d'accueil

La page À propos vous mène au site Internet du MGC Eversense, et indique la version et la date de publication de l'application.

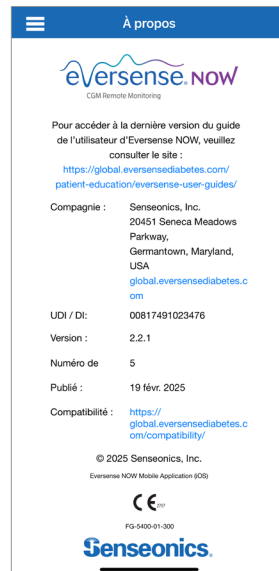


À propos

Eversense NOW vous demande de confirmer avant de vous déconnecter. Si vous vous déconnectez de l'application, vous devrez à nouveau entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour rouvrir l'application.

Vous pouvez ajouter votre photo de profil en la touchant dans le menu principal de l'application Eversense NOW. Suivez les indications pour prendre une photo ou ajouter une photo qui est déjà sauvegardée sur votre appareil mobile. La photo que vous ajoutez au profil s'affichera aussi sur l'application de l'utilisateur MGC en face de votre nom.



Se déconnecter

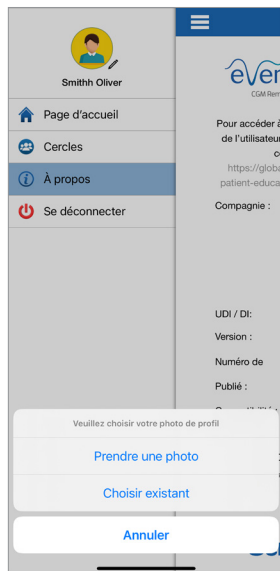

Photos du profil

Afficher des données MGC

La page d'accueil affiche la liste des personnes dont vous pouvez voir les données MGC à distance, leur dernière valeur du taux de glucose et une flèche de tendance qui indique le sens et le taux de variation.

Par défaut, la liste est triée par Nom. Vous pouvez trier la liste par Nom ou par Valeur du taux de glucose en cliquant sur l'onglet correspondant en haut de la page.

Page d'accueil Eversense NOW


Pour actualiser la page d'accueil :

1. Ouvrez la Page d'accueil.


2. Balayez vers le bas depuis la Page d'accueil.

Les taux de glucose provenant de l'utilisateur du MGC sont actualisés automatiquement sur votre application Eversense NOW toutes les 5 minutes environ, à condition que vous et l'utilisateur du MGC disposiez d'une connexion Internet et que le partage de données soit activé.

Mise en garde : si l'utilisateur du MGC Eversense a désactivé la synchronisation automatique, aucune donnée de glucose n'est envoyée vers votre application Eversense NOW.

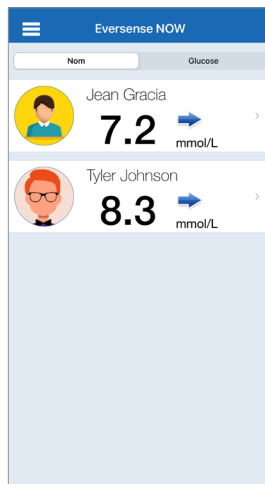

Page d'accueil triée par Nom

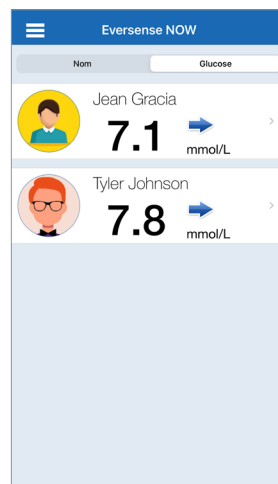






Page d'accueil triée par Valeur du taux de glucose, de la plus basse à la plus élevée

Flèches de tendance

Une flèche de tendance apparaît à côté du nom de l'utilisateur du MGC. Cette flèche de tendance indique le sens et la vitesse de variation du taux de glucose.

L'application utilise les **20 dernières minutes de données de glucose continues** pour calculer des tendances de glucose. Lorsqu'il n'y a pas un assez grand nombre de valeurs pour faire le calcul, la flèche n'apparaît pas.

| | |
|---|---|
|  | Niveaux du taux de glucose qui s'élèvent ou chutent progressivement à une vitesse comprise entre 0,00 mmol/l et 0,06 mmol/l par minute. |
|  | Niveaux du taux de glucose qui s'élèvent modérément à une vitesse comprise entre 0,06 mmol/l et 0,11 mmol/l par minute. |
|  | Niveaux du taux de glucose qui chutent modérément à une vitesse comprise entre 0,06 mmol/l et 0,11 mmol/l par minute. |
|  | Niveaux du taux de glucose qui augmentent très rapidement, à une vitesse de plus de 0,11 mmol/l par minute. |
|  | Niveaux du taux de glucose qui chutent très rapidement, à une vitesse de plus de 0,11 mmol/l par minute. |

État

Dans le système MGC Eversense, cinq états distincts peuvent être listés à côté du nom de l'utilisateur.



Dernière valeur du taux de glucose

L'utilisateur reçoit des valeurs du taux de glucose activement.



« Hors ligne »

L'utilisateur a temporairement désactivé le partage de ses valeurs avec vous. (Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes pour que le nouvel état apparaisse sur votre application Eversense NOW).

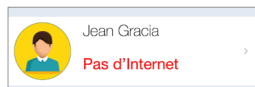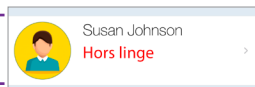

« Transmetteur déconnecté »

Il n'y a pas de connexion entre le Smart Transmetteur et l'application MGC Eversense. Ceci peut se produire lorsque :

- La batterie du Smart Transmetteur doit être rechargée ou est en cours de charge.
- La connexion Bluetooth ou l'appareil mobile peut être désactivé.
- Le Smart Transmetteur est hors de portée ou éteint.



« --- »

Le Smart Transmetteur de l'utilisateur est connecté mais il ne reçoit pas de valeurs du taux de glucose ou le nombre de relevés est trop limité pour afficher une valeur. Ceci peut se produire lorsque :

- Le système MGC est en phase d'acclimatation.
- L'utilisateur du système MGC est en phase d'initialisation et n'a pas encore reçu sa première valeur du taux de glucose.
- L'utilisateur a reçu une alerte qui empêche l'affichage du taux de glucose.

« Pas d'Internet »

- Lorsque l'utilisateur du MGC Eversense n'est pas connecté à Internet.
- L'utilisateur du MGC a désactivé la synchronisation automatique.


Connexion à Internet

Une connexion à Internet est nécessaire pour que l'application Eversense NOW affiche les données MGC Eversense.

Si le téléphone est déconnecté d'Internet, cette fenêtre contextuelle apparaît :

Votre liste des utilisateurs du MGC Eversense NOW et leurs données de glucose n'apparaîtront qu'une fois que la connexion à Internet aura été restaurée.


Votre liste des utilisateurs du MGC Eversense NOW et leurs données de glucose apparaîtront une fois que la connexion à Internet aura été restaurée.

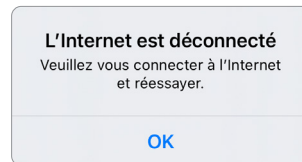


Grphe de tendance

Pour voir des informations plus détaillées concernant un utilisateur MGC, tapez sur l'un des noms d'utilisateur de système MGC Eversense sur la page d'accueil. Le premier écran représente un graphe de tendance des valeurs du taux de glucose capteur de l'utilisateur sur les trois dernières heures. Une flèche de tendance indique dans quel sens le taux de glucose varie et à quelle vitesse.

Pour actualiser l'écran, tapez sur l'icône d'actualisation .

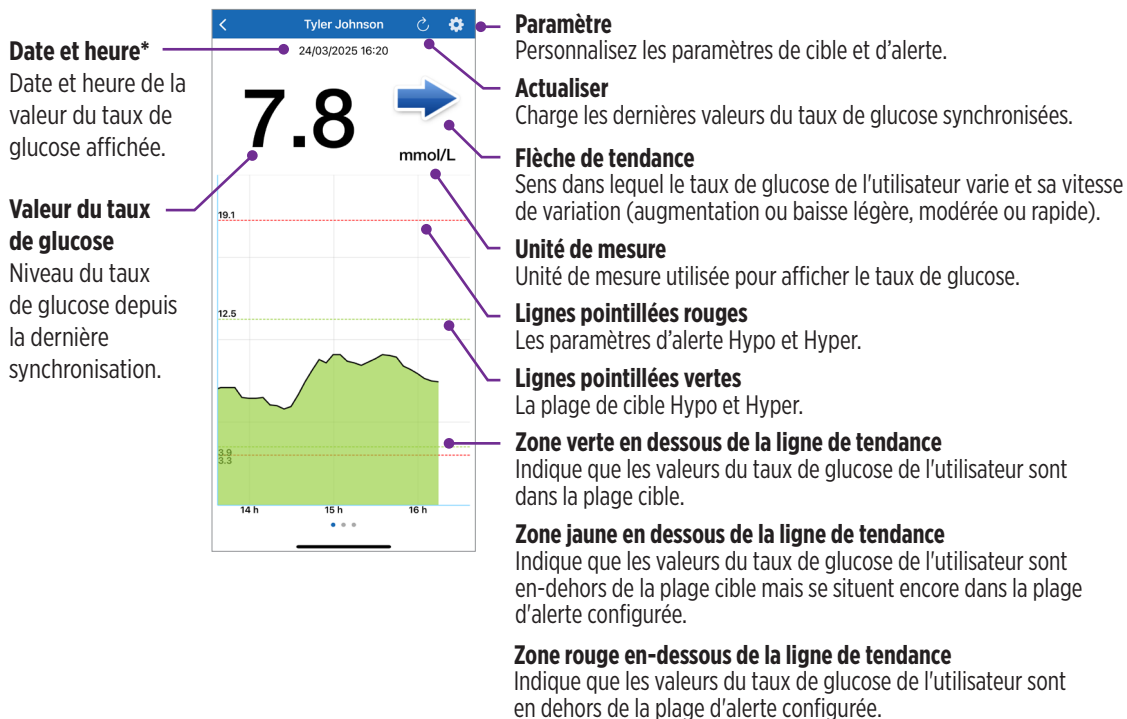

** Si vous ne recevez pas de nouvelles valeurs du taux de glucose dans les 5 minutes qui suivent la valeur du taux de glucose la plus récente, la date et l'heure apparaissent en rouge.*


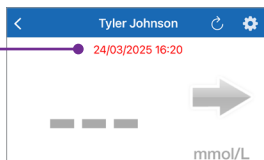


Paramètres personnalisés


L'application Eversense NOW vous alerte lorsque les niveaux de taux de glucose sont en dehors des paramètres d'alerte que vous choisissez pour cet utilisateur du MGC. Les paramètres affichés (par défaut) reflètent les paramètres de l'utilisateur du MGC. Vous pouvez personnaliser les niveaux auxquels vous voulez être alerté par l'application Eversense NOW. Une fois qu'ils sont définis, l'application émet une alerte sonore (selon les paramètres de votre téléphone) et affiche un message à l'écran.

Remarque : une modification des paramètres d'alerte ou de cible ne modifie pas les paramètres d'alerte ou de cible définis par l'utilisateur du MGC sur son système.

Lorsque vous consultez le graphe de tendance d'un utilisateur du MGC, vous pouvez personnaliser les paramètres d'alerte en touchant .

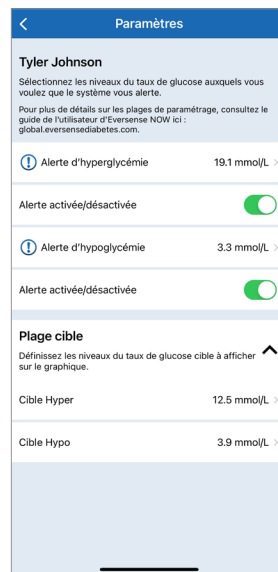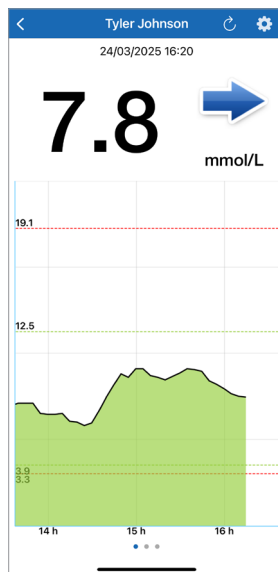

Pour personnaliser les paramètres de cible et d'alerte :

1. Cliquez sur .
2. Sélectionnez les niveaux d'alerte d'hyperglycémie et d'hypoglycémie auxquels vous voulez que le système vous alerte.
 - a. Cliquez sur « **Alerte Hyper** » et sélectionnez le niveau d'alerte Hyper approprié.
 - b. Cliquez sur « **Terminé** » lorsque vous avez terminé.
 - c. Répétez cette opération pour la sélection « **Alerte Hypo** ».

| | |
|-------------------------------------|---|
| Paramètres affichés (par défaut) | Paramètres utilisateur MGC |
| Plage de paramétrage | Faible : 3,3 - 6,4 mmol/l Élevé : 6,9 - 19,4 mmol/l |
| Paramètre Activé/Désactivé | Les paramètres d'Alerte Hypo et Hyper peuvent être activés et désactivés. |

3. Sélectionnez les niveaux de taux de glucose cibles. Ce sont les niveaux inférieur et supérieur utilisés pour indiquer quand les valeurs de taux de glucose de l'utilisateur du MGC sont dans la plage. La plage de cible Hypo et Hyper doit être définie avec les niveaux d'alerte d'hyperglycémie et d'hypoglycémie que vous avez sélectionnés.
- Sous Niveaux de taux de glucose cibles, cliquez sur « **Cible Hyper** » et sélectionnez le niveau de cible d'hyperglycémie approprié.
 - Cliquez sur « **Terminé** » lorsque vous avez terminé.
 - Répétez cette opération pour la sélection « **Cible Hypo** ».

| | |
|----------------------------------|--|
| Paramètres affichés (par défaut) | Paramètres utilisateur MGC |
| Plage de paramétrage | Faible : 3,6 - 6,7 mmol/l Élevé : 6,7 - 19,3 mmol/l |
| Paramètre Activé/Désactivé | Toujours activé |
| Remarques | Utilisé dans les graphes et les tableaux de l'application pour indiquer le temps passé dans la plage cible |

Avertissements : les taux de glucose affichés dans l'application Eversense NOW ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions thérapeutiques. L'application Eversense NOW est un affichage secondaire des données MGC Eversense ; il ne remplace pas l'affichage principal.

Alertes Eversense NOW

L'application Eversense NOW vous alerte lorsqu'une valeur du taux de glucose d'un utilisateur du MGC Eversense est en dehors de la plage d'alerte définie.


Ces alertes peuvent apparaître de l'une de ces quatre façons : sur votre écran verrouillé, sous forme de notification en haut de votre écran, sous forme d'un pop-up de l'application ou sur une montre Apple.

Avertissement : les taux de glucose affichés dans l'application Eversense NOW ne doivent pas être utilisés pour prendre des décisions thérapeutiques. L'application Eversense NOW est un affichage secondaire des données MGC Eversense ; il ne remplace pas l'affichage principal.


Remarque : pour pouvoir recevoir les alertes relatives aux taux de glucose sur votre Apple Watch, les notifications réciproques doivent être activées dans les paramètres de votre montre.



Alerte : écran de verrouillage

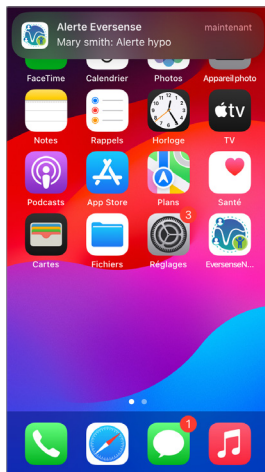

Alerte : notification

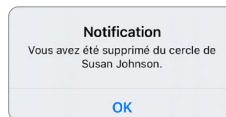

Alerte : dans un pop-up dans l'application



Alerte : sur l'Apple Watch

Historique des alertes

Pour voir l'historique des alertes relatives au taux de glucose d'un utilisateur MGC Eversense, glissez votre doigt sur l'écran vers la gauche à partir du graphe de tendance.

L'écran **Historique des alertes** indique les 20 dernières alertes liées au glucose que l'application MGC Eversense a affichées.

Ces alertes signalent des événements tels que les alertes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie.

| Alertes de glucose | | |
|-----------------------|--------------|-------|
| vendredi 14 mars 2025 | | |
| ⓘ | Hypoglycémie | 10:28 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 09:58 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 09:43 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 09:28 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 08:58 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 08:43 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 08:28 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 08:13 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 07:02 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 06:47 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 06:32 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 06:17 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 06:02 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 05:52 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 05:37 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 05:22 |
| ⓘ | Hypoglycémie | 05:07 |

Journal des événements

Pour afficher le journal des événements de l'utilisateur du MGC Eversense, faites défiler l'écran vers la gauche à partir de l'Historique des alertes.

Le **Journal des événements** indique les 20 événements les plus récents consignés par l'utilisateur du système MGC. Le journal des événements montre des informations entrées par l'utilisateur MGC Eversense comme les étalonnages, les repas, les périodes d'exercice physique, les valeurs de glycémie, les valeurs de l'insuline et l'état de santé. Si l'utilisateur n'a pas entré d'événement dans son journal, ce journal est vide.



| Journal des événements | | |
|------------------------|--|-------|
| vendredi 21 mars 2025 | | |
| Étalonnage, 8.2 mmol/L | | 12:06 |
| Étalonnage, 8.2 mmol/L | | 12:06 |
| Exercice | | 08:20 |
| jeudi 20 mars 2025 | | |
| Insuline | | 20:04 |
| Repas | | 13:05 |
| mercredi 19 mars 2025 | | |
| Étalonnage, 2.7 mmol/L | | 16:42 |
| mardi 18 mars 2025 | | |
| Étalonnage, 5.5 mmol/L | | 16:44 |
| Glucose, 5.5 mmol/L | | 16:37 |
| Étalonnage, 5.5 mmol/L | | 16:34 |
| Étalonnage, 2.6 mmol/L | | 14:40 |
| lundi 17 mars 2025 | | |
| Étalonnage, 3.5 mmol/L | | 21:15 |
| Étalonnage, 3.4 mmol/L | | 21:04 |
| Étalonnage, 5.5 mmol/L | | 15:36 |

Mentions légales

Mention légale d'Apple

« Made for iPod touch », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod touch, un iPhone ou un iPad, respectivement et qu'il a été certifié conforme aux standards de performance Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de réglementation et de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod touch, un iPhone ou un iPad peut affecter sa performance sans fil.

Apple, iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mention légale de Google

Le nom « Andoird », le logo Andoird et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

À propos du Bluetooth®

Bluetooth® est un type de communication sans fil (communication RF). Les appareils mobiles comme les smartphones et d'autres encore utilisent la technologie Bluetooth®. Votre Smart Transmetteur utilise le Bluetooth® intelligent pour se jumeler à l'appareil mobile et envoyer les résultats à l'application.

Marque déposée Bluetooth®

Le terme Bluetooth® et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth® SIG, Inc. L'usage de tels termes ou logos par Senseonics, Inc. se fait sous licence.

Informations FCC

Votre Smart Transmetteur est conforme aux réglementations FCC (Part 15). Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui sont susceptibles de causer un dysfonctionnement.

Les changements ou modifications non approuvés par Senseonics, Inc. pourraient annuler l'autorisation consentie à l'utilisateur d'exploiter les équipements.

Ces directives servent à assurer que votre Smart Transmetteur n'affectera pas le fonctionnement des autres appareils électroniques qui sont à proximité. De plus, les autres appareils électroniques ne doivent pas affecter votre Smart Transmetteur.

À l'exception de votre appareil mobile, les autres appareils électroniques sans fil utilisés à proximité, comme les téléphones cellulaires, les fours à micro-ondes ou les réseaux sans fil peuvent bloquer ou retarder la transmission des données de votre Smart Transmetteur vers l'application. Si vous vous en éloignez ou si vous les arrêtez, la communication sera rétablie.

Le Smart Transmetteur a été testé et déclaré conforme à un usage domestique. Dans la plupart des cas, s'il est utilisé comme indiqué, il ne devrait pas interférer sur les autres appareils électroniques domestiques. Cependant, le Smart Transmetteur émet de l'énergie RF. S'il n'est pas utilisé comme indiqué, votre Smart Transmetteur pourrait interférer avec votre téléviseur, votre radio ou avec les autres appareils électroniques qui reçoivent ou transmettent des signaux RF.

Si vous rencontrez des problèmes d'interférence avec votre Smart Transmetteur, essayez de vous éloigner de la source des interférences. Vous pouvez aussi déplacer l'appareil électronique ou son antenne ailleurs pour résoudre le problème.

Si les interférences ne disparaissent pas, contactez le Service clientèle du fabricant de l'appareil électronique responsable des interférences.

Directive sur les équipements radio

Senseonics, Inc. déclare que l'équipement hertzien de type Smart Transmetteur Eversense E3 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.eversensedidiabetes.com/declarationofconformity>.

Index

- Adaptateur d'alimentation..... 29
- Alertes..... 92, 96, 100, 102, 108, 123, 124, 125, 127
- Alertes et notifications, Apple Watch..... 178
- Appareil mobile..... 30, 71
- Appareil mobile, Apple Watch.. 175
- Application, à propos..... 11, 93
- Application, démarrage..... 31
- Application, informations produit... 170, 173
- Application, se déconnecter..... 174
- Application, télécharger..... 30
- Application, utiliser..... 69
- Bluetooth..... 93, 338
- Bluetooth, réactiver..... 216, 217
- Bouton sur le Smart Transmetteur.. 35, 48, 54
- Capteur..... 208
- Capteur, à propos..... 10, 208, 211
- Capteur, insertion et extraction..... 209, 210
- Chargeur..... 18
- Composants du système..... 10
- DEL..... 29, 48, 54, 57, 58
- Dépannage, FAQ..... 212
- DMS Eversense..... 165, 262
- Écran MON GLUCOSE... 39, 69, 72, 92
- Étalonnage, Phase d'initialisation... 59, 62
- Étalonnage, Phase quotidienne..... 59, 63
- Étalonnage, procédure.. 59, 65, 92
- Événements..... 93, 154
- Flèches de tendance..... 75
- Graphes de tendance..... 91
- Guide de placement, puissance du signal..... 52, 93
- Indicateur de niveau de charge de la pile..... 56
- Informations FCC..... 339
- IRM, Imagerie par résonance magnétique..... 16, 17
- Jumeler, Smart Transmetteur et appareil mobile..... 31, 35, 216
- Menu..... 92
- Mode de détection..... 35, 216, 219
- Mode Ne pas déranger..... 117
- Mon Cercle..... 168, 199
- Niveaux cibles..... 98
- Notifications..... 124, 150, 195
- NOW Eversense..... 313
- Paramètre de rappel..... 108
- Paramètres, application..... 31, 93, 94, 105
- Partage de données..... 165
- Partage de l'application..... 169
- Partager mes données..... 165
- Patch adhésif..... 50, 53
- Pile, charger..... 28
- Profil temporaire..... 120
- Rapports..... 93, 162
- Réactiver le Bluetooth..... 216, 217
- Réinitialiser le Smart Transmetteur.. 140, 217
- Relier, Smart Transmetteur avec capteur..... 41
- RF, communication radio fréquences..... 338
- Sans fil..... 13, 27, 69, 338
- Smart Transmetteur, à propos... 10, 18
- Smart Transmetteur, fixer..... 50
- Smart Transmetteur, maintenance.. 55
- Smart Transmetteur, marche/arrêt.. 54
- Smart Transmetteur, réinitialiser.... 140, 217

| | |
|--|-----|
| Smart Transmetteur, utiliser..... | 48, |
| 49 | |
| Symboles, alertes, notifications..... | |
| 253, 254, 255 | |
| Symboles, emballage et appareil... .. | |
| 256, 257, 258 | |
| Systeme de gestion des donnees (DMS)..... | 165 |
| Unité de mesure..... | 37 |
| USB, câble..... | 28 |
| USB, port..... | 28 |
| Voyages..... | 211 |

Basic UDI/DI:

- Kit de Smart Transmetteur Eversense E3 : 081749102FG3500T8
- Kit de patchs adhésifs Eversense E3 : 081749102FG6400TQ
- Chargeur Eversense : 081749102FG6501TX
- Application Eversense mobile iOS : 081749102FG5101T4
- Application Eversense mobile Android : 081749102FG5301TE
- Eversense DMS: 081749102FG5200T7
- Application mobile Eversense NOW iOS : 081749102FG5400TH
- Application mobile Eversense NOW Android : 081749102FG5401TK

Appeler 061 544 79 90 pour le support clientèle.



Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA

global.eversensedidiabetes.com

Brevets :

www.senseonics.com/products/patents



Senseonics



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



MedEnvoy Switzerland

CH: Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



(241) LBL-4202-09-101_REV_L