




מדריך למשתמש

מדריך שימוש עבור Eversense E3
מערכת לניטור סוכר רציף

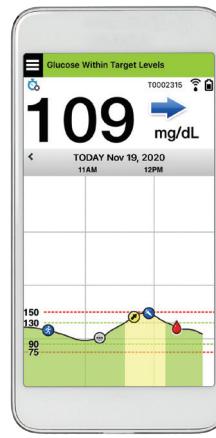

אפליקציה לנייד



%;"> משדר חכם חישון



Continuous Glucose Monitoring System

סימן מסחרי E3

Eversense E3 CGM, Eversense E3, Eversense E3 ניתור סוכר רציף, Eversense E3, Eversense E3 משדר חכם, Eversense E3 אפליקציה ולוגו Eversense E3 הם סימנים מסחריים של Eversense E3 Incorporated, Senseonics, Incorporated. מותגים אחרים והמצריים שלהם הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעלים החוקיים.

תוכן

		רשימת מונחים
26	שלב 2. הגדרת האפליקציה - ייצרת חשבון, קיישור והגדירות	5
33	סמלית החיבור של המשדר החכם	7
34	4. קיישור החישין	7 ערכה ותמכה
40	5. נשיאת משדר יומית	8 מרכבי המערכת Eversense E3 CGM
41	שימוש יומיומי	11 דרישות המערכת
42	הצמדת המשדר החכם לחישין שהוחדר	11 הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות
45	הפעל וכבה את המשדר החכם	12 מכשירים פרוציטים
46	טיפול ותחזוקת המשדר החכם	12 מסך או כפטור מוקולקלים
46	מחוון סוללה	12 שינוי מכשיר
47	מחווני מצב נוריות חיוי	12 התווויות לשימוש
48	6. כיול המערכת	13 מידע בטיחות בקשר ל-MRI
50	שלבי כיוול	14 התווויות נגד
53	אופן הcoil	14 מה כולל בחבילה זו
57	7. השימוש באפליקציה	14 AIR להשתמש במדריך למשתמש זה
58	ניהול חשבון Eversense	15
59	בדוק את הגדרות המכשיר הנייד שלך	17 סיכונים ותופעות לוואי
60	הכרטיס מסך "My Glucose" ("הטוכר של")	18 ازהרות
63	חזי מגמה	20 אמצעי זהירות
64	להבין את החלטות הטיפול עם ה-CGM	22
66	שוחח עם הצוות הרפואי שלך	23 הטען את המשדר החכם שלך
		25 שלב 1. הורד והתקן את האפליקציה
		2. הטעות וכיוכנים
		17 סיכונים ותופעות לוואי
		18 ازהרות
		20 אמצעי זהירות
		3. תחילת השימוש
		23 הטען את המשדר החכם שלך
		25 שלב 1. הורד והתקן את האפליקציה

140	בריאות	68	ביצוע של החלטות טיפול עם Eversense E3
141	פעילות גופנית	70	חיצי מגמה של E3 והחלטות טיפול מה תעשה
142	11. דוחות	72	גראף מגמה
143	סיכום מודלי שבועי	76	אפשרויות תפיריט
144	סטטיסטייקות סוכר	77	
144	תרשים עוגה עבור הסוכר.		
145	12. שף את הנתונים שלי	78	8. התאמת אישית של הגדרות שלך
	Data Management Software (DMS)		הגדרה של רמות התראות עבור רמות סוכר
145	של Eversense	80	הגדרה של רמות יעד עבור רמות סוכר
146	סנכרון	82	הגדרת התראות חייז'
147	הمعالג שלך	84	הגדרה של התראות עבור קצב שינוי
149	13. מידע מוצר ומידע כללי בתוך האפליקציה.	86	הגדרה של תזכורות צילול יומיות
150	תמונה רפואי	88	הגדרת מידע אודוט המרכת
152	יציאה מן המערכת	89	קשר חדש של חישון
153	Eversense E3 נתוני Apple על גבי שעון ה-Apple	90	הגדרת ציללים
156	התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple	92	הגדרת מעקב לסוכר נמוך
176	15. המمعالג שלך	93	הגדרת ניתוק משדר
	ניתוח מרוחק באמצעות מערכת Eversense E3	99	הגדרת פרופיל זמני
176	Eversense CGM ואפליקציית NOW	102	
105	9. תיאורי התראות	105	10. יומן אירועים.
107	Alert History (היסטוריה התראות)	107	סוכר
109	תיאורי התראות ופעולות	109	ארוחות
			איינסולין

218	20. נתוניים טכניים	182	16. אודוט החישן
218	חישן	183	שלבי החדרה
219	משדר חכם	184	שלבי הסרת
220	מקור מתח ומטען		
220	cabl USB לטעינה והורדת נתונים	185	17. נסיעות
221	תקנים חשמליים ותקני בתיות		
224	סמלים באפליקציה Eversense CGM	186	18. איתור וטיפול בעווית
227	סמלים על אריזות ומארזים	186	משדר חכם
230	Eversense E3 אחריות מגבלת עבור	188	סוללת המשדר החכם וטעינה
	משדר החכם	189	הchipbor עם המשדר החכם
233	הודעות משפטיות	192	כיוול
233	הودעה משפטית מטעם Apple	194	התראות והודעות
233	הודעה משפטית מטעם Google	196	קירות וסוכר
233	אודוט® Bluetooth®	197	קבלת החלטות טיפול
233	סימן מסחרי Bluetooth®	198	האפליקציה
234	FCC מידע	198	חזי兆מה
234	הנחיית ציוד רפואי	200	חישן
235	אינדקס	202	סנוורן
		202	ארועים
		203	קיוצרי דרך
204	20. ביצוע התקן		
204	ביצוע מחקר קליני		
	דיקוק E3 Eversense אל ISI		
206	במחקר PROMISE		
216	חזי החישן		
217	בתיות		

רשימת מונחים

למספר רב של מכשירים ניידים ישנו מצב 'נא לא להפריע' ונפרד. למידע נוסף, עיין בהוראות היצרן.
הפרעה אלקטромגנטית שדה אנרגיה חזק המיוצר על ידי מכשירים חממיים או מגנטיים.

EULA הסכם רישיון עבור משתמש קצר
אפליקציית Eversense תוכנה שモתקנת במכשיר נייד ומשמשת להציג נתוני סוכר CGM הנשלחים מה مصدر החכם.
Eversense DMS אפליקציה מבוססת אינטראקטו התואמת לאפליקציית Eversense Eversense שבה נתוני הסוכר מאחסנים וניתנים לצפייה.

Eversense NOW אפליקציה ניטור מרוחק המאפשרת לך לשתף את נתוני הסוכר שלך עם אנשים אחרים.

FAQ שאלות נפוצות

צווות רפואי צוות רפואי מקטוע ומוסמך אשר בשלים בהצלחה את תוכנית ההכשרה בโนasha החדרה והסורה של Eversense E3 CGM ואשר קרא ובין את הוראות החדרה והסורה של חישון Eversense E3 CGM.

קריאת "HI" מצינית שקריאת הסוכר של החישון היא $> 400 \text{ mg/dL}$.

היפרגליקמיה מצב שבו רמת הסוכר בدم גבוהה.
היפוגליקמיה מצב שבו רמת הסוכר בדם נמוכה.

התרעה התראה מזהירה שקיים מצב שדורש את תשומת לך וועלך להגיב/לנקוט בעולה מתאיימה.

מד סוכר בدم מכשיר הזמן באופן מסחרי המשמש למדידת רמת הסוכר על ידי שימוש בדגימת דם מהאצבע.

Bluetooth® שם מותג עבור טכנולוגיית רשתות אלחוטיות העשויה שימוש בתדרי רדיו בעלי גלים קצרים (RF) על מנת לחבר מכשירים ניידים ומיכליים אלקטטרונים אלחוטיים אחרים.

כיוול קריית רמת סוכר בدم מהאצבע מזונת אל תוך אפליקציית Eversense על מנת לבדוק את דיקן המרפקת. עם מערכת ה-E3, Eversense ישים שני שלבים: בשלב האתחול שבמהלכו יש לבצע 4 דגימות דם מהאצבע, ושלב הcoil היומי, שבמהלכו נדרשת דגימת דם מהאצבע פעמיים ביום.

CGM ניטור סוכר רציף. ניטור רציף של רמות הסוכר מהאזור הבין-תאי מיידי כמו דקוקת.

התוויות נגד מצבים או נסיבות בהם אדם אינו יכול להשתמש במכשיר.

CT טומוגרפיה ממוחשבת
מצב 'נא לא להפריע' (DND באפליקציה Eversense) כאשר פועל, האפליקציה תפסיק להציג התראות שאינן קריטיות, ומה مصدر החכם יפסיק לספק הודעות רטט עבור התראות שאינן קריטיות. התראות קריטיות תמשכה להגעה.

הסוכר מדווחות ב-ממו"ל/l", דבר המראה את רמת הסוכר בدم כאשר נעשה שימוש במד סוכר בدم, או את רמת הסוכר בנזול בין-תאי כאשר נעשה שימוש בכמה מערכות CGM, כגון מערכת Eversense E3 CGM-הMRI.

MRI דימות תהודה מגנטית

תליי MR עצם אשר הוכח כבטוח בסביבת MR בתנאים המוגדרים הכלולים תנאים עבור השדה המגנטי הסטטי, השדות המגנטיים המודורגים על פי זמן וشدות תדריות הרדיו.

קצב שינוי/חיצי מגמה מצינים את הכיוון ואת מהירותו השני של רמות הסוכר שלך.

נטיר מרוחק תכונה אופציונלית המאפשרת לך להזמין אחרים לראות את נתוני CGM שלך על ידי שימוש ב-*Now*, אפליקציה נפרדת למכשירים ניידים שאותה עליהם להורד למכשיר נייד תואם.

חיישן התקן המוחדר מתחת לעור עבור מדידה רציפה של רמות הסוכר בנזול בין-תאי.

הגדרת נמנום משמשת להגדרת תדריות החזרה של התרעעה.

תת-עוררי ממקום מתחת לעור.

מדדר חכם מכשיר לשימוש רב-פערני שנישא באופן חיוני מעל החישן המוחדר, מפעיל את החישן ושולח את נתוני הסוכר למכשיר ניידلتצוגה באפליקציית Eversense.

שלב החימום פרק הזמן הנדרש לכוונון החישן לאחר שהוחדר ולפני הcoilים.

נזול בין-תאי (ISF) הנזול הנמצא בין תא הגוף Eversense E3 CGM-הMRI מוגדר את רמת הסוכר מnzול בין-תאי, בגיןו לרמת הסוכר בדם המשוגת באמצעות בדיקת דם מהאזור.

מכשיר פרוץ מכשיר (אייפון או אייפוד) אשר שונה על מנת להסיר את הבקרות וההגבלות של הייצן המקורי.

لد דiodה פולטת אור

חיישן מקשר חיישן המחבר למדדר חכם. **קריאת "O"** מראה שקריאת חיישן סוכר היא > 40 מ"ג/דל.

מכשיר נייד מכשיר נישא המבוסס על מערכת הפעלה למכשירים ניידים שפעילה את אפליקציית Eversense ומנהלת תקשורת עם המשדר החכם.

מ"ג/דל מיליגרים לדציליטר, יחידת מידת המראה ריכוז חומר מסויים בكمות נזילות ספציפית. בחלק מן המדינות, כולל בארצות הברית, תוכאות בדיקות הסוכר מדווחות ב-מ"ג/דל, דבר המראה את רמת הסוכר בדם כאשר נעשה שימוש במד סוכר בדם, או את רמת הסוכר בנזול בין-תאי כאשר נעשה שימוש בכמה מערכות CGM, כגון מערכת Eversense E3 CGM-הMRI.

mmo"l/l אלפיות מול לליטר, יחידת מידת המראה ריכוז חומר מסויים בكمות נזילות ספציפית ממ"ל/l - מילימולים לליטר, טר, יחידת מידת המראה ריכוז חומר מסויים בكمות נזילות ספציפית. בהרבה מן המדינות, תוכאות בדיקות

1. מבוא

חלק זה מפרט את אופן השימוש במדריך זה ומתאר את מערכת *Eversense E3 CGM* החדשה שברשותך, כולל הרכבים הכלולים ומטרת השימוש בה.

ברכוטינו על קבלת טכנולוגיית *Eversense E3 CGM* שתסייע לך בניהול הסוכרת. מערכת-ה-*E3 CGM* שלך מיועדת למדידה של רמות הסוכר עד ל-180 ימים לאחר החדרת החיסון שלך. מידע בגין רמות הסוכר הנאוסף על ידי המערכת נשלח באופן אוטומטי למכשיר הנידי שלך. עלייך לפנות לרופא שלך לפחות מועד להחדרה והסירה של החיסון.

עזרה ותמיכה

אנא עיין במדריך זה למשתמש ביחד עם ספק שירותי הבריאות שלך. למידע נוסף ואיתור וטיפול בעיות הנוגעות למוצר *Eversense E3*, צור קשר עם מחלקת שירות לקוחות טלפון (844-736-7348) (844-SENSE4U). אם אתה נמצא מחוץ לארה"ב, צור קשר עם המפיצ' המקומי או בקר באתר <https://global.eversensediabetes.com>. על מנת לעיין בגרסה העדכנית ביותר של המדריך למשתמש, בקר בכתובת <https://global.eversensediabetes.com>.

מרכיבי המערכת Eversense E3 CGM

המערכת מכילה (1) חיישן קטן המוחדר אל מתחת לעור על ידי צוות רפואי מסמך (2) משדר חכם הנitin להסרה הממוקם מעל לחישון, וכן (3) אפליקציה למכשירים ניידים שבה מוצגת קריינות הסוכר.



חיישן



משדר חכם

Eversense E3 חיישן


החיישן מוחדר מתחת לעור (בחלק העליון של הזרוע) ומודד את הסוכר בזוזל הבין-תאי לתקופה של עד 180 ימים. רמות הסוכר מחושבות לאחר מכן על ידי המשדר החכם ונשלחות לאפליקציה.

Eversense E3 משדר חכם

המשדר החכם הנשלף מולבש באופן חיצוני מעל החיישן ומפעיל אותו. הוא שולח נתונים סוכר באמצעות אלחוטי (Drift Bluetooth) לאפליקציה המותקנת במכשיר הנייד שלך. המשדר החכם מספק גם התראות רטט על הגוף המבוססות על הגדרות רמות הסוכר אותן תבחר. למשדר ישנה סוללה הניתנת לטעינה וניתן להשתמש בו לתקופה של עד שנה אחת.

אפליקציית Eversense

אפליקציית Eversense היא תוכנה שפועלת במכשיר נייד (לדוגמה, טלפון חכם או טאבלט) ומציגת נתונים סוכר במגשון דינמי. היא מספקת גם התרעות המבוססות על האדרות הפסיכר שתבחור.

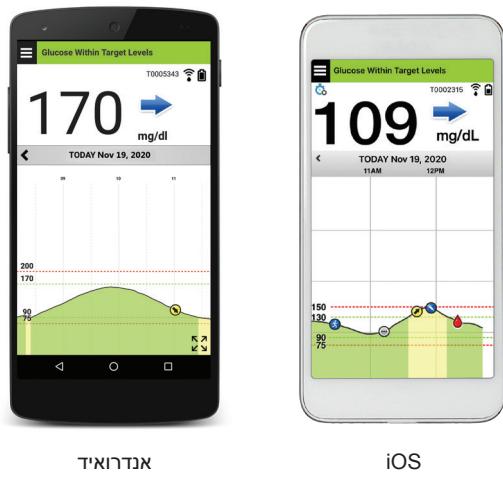

Eversense פרישת המוסכים של אפליקציית המשנה בהתבסס על הדגם ו/או מערכת הפעלה של המכשיר הנייד שלך. בהתאם לכך זה למשתמש הצללו כמה דוגמאות להבדלים אלו.

ואודא שהמכשיר החכם שלך עושה שימוש
במערכת הפעלה העדכנית ביותר אשר
רשומה כתואמת באתר שלנו
<https://global.eversensediabetes.com/.compatibility>

חשיבות: על מנת להשתמש במערכת ה-Eversense E3 CGM, עליך להיות בעל הבנה בסגנון של הורדה ושימוש באפליקציות למכשירים ניידים במקשיר הנייד שלך. נתונים מן המصدر החכם ה-Eversense E3-
�� שלחים באופן אלחוטי דרך Bluetooth. קרא בעיון את ההוראות במדריך למשתמש להורדה והתקנה של
אפליקציית Eversense למכשירים ניידים ולשייר המכשיר הנייד למשדר החכם. אם ישנו משהו שאינו מבין
במדריך זה למשתמש, אנא צור קשר עם המפתח המקומי שלך.

המערכת יכולה גם מדברות לשימוש יומי, ואלו תספקנה לך על ידי ספק שירות הכספי שלך לאחר החדרת החישון. למדבות ישנו צד נצמד אקריליק אשר נצמד אל החלק האחורי של המסדר החכם, וצד נצמד מסיליקון הנצמד אל העור.

מבט כללי על מערכת ה-E3 Eversense

מערכת נפרדת לניטור הסוכר בدم (אשר איננה מסופקת על ידי Senseonics) נדרשת על מנת לכיל את מערכת CGM ועל מנת לקחת החלטות בנוגע לטיפול תחת תנאים מסוימים. ראה להבין את ההחלטה הטיפול עם CGM. כאשר געשה בהם שימוש נכון, מרכיבים אלו עובדים ביחד על מנת להבטיח שהיאvrן רק ניטור רציף של רמות הסוכר שלא לתקופה של עד 180 ימים.

כדי להבטיח קבלת קריאות סוכר רציפות ומידע נוסף, פועל בהתאם לעוצות אלה לשימוש יומי:

- ✓ לבש את המשדר החכם שלך בכל זמן, לפחות בעת הטעינה.
- ✓ המשדר החכם עמיד למים בעומק של עד מטר אחד (3.2 רגל), במשך 30 דקות. חשיפה של המשדר החכם לתנאים מעבר לאלו שציינו, תזיק לו ותגרום לך לאבד את האחריות שלו.
- ✓odia שלמשדר החכם יש מספיק מתח סוללה כל הזמן.
- ✓ בצע שתי בדיקות כיול באמצעות מד סוכר בדם בכל יום כאשר תתבקש לעשות זאת.
- ✓ שים לב להתראות והודעות אשר תקבל מן המשדר החכם שלך ומהממשק הנייד.
- ✓ החלף את המדקקה על גבי המשדר החכם שלך בכל יום.
- ✓ ניתן להסיר את המשדר החכם מן החלק העליון של הזרוע בכל עת, אך לא בזמן הכיוול. זכור שלא נאספים נתונים כאשר המשדר החכם אינו מותקן עם החישון. כאשר אתה מניח את צידו האחורי של המשדר החכם שלך על גבי מיקום החישון, תידרשו עד ל-10 דקות על מנת שהמשדר החכם יתקשר עם החישון, ו硕ריונות תתחילה להופיע באפליקציה.
- ✓ כאשר המשדר החכם וממשק הנייד לא נמצא באותו מתחם אחד מהשני, הנתונים הנאספים על-ידי המשדר החכם מאוחסנים ונשלחים לאפליקציה כאשר הממשק הנייד והמשרד החכם יימצא שוב באותו טווח.
- ✓ ניתן לשאת בבטחה את החישון והמשדר החכם כאשר עוברים דרך גלאי מתכת בשדות תעופה. בזמן טיסה, המשדר החכם יתנהג כמו דומה לכל מקשר Bluetooth אחר. הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות הספציפיות שקבעה חברת התעופה.

- הנה כמה מהתכונות של מערכת Eversense E3 CGM:
- תקשורת אלחוטית עם החישן, המשדר החכם והאפליקציה.
 - שימוש בחישין לפחות על ידי החדרתו לחלק העליון של הזרען לתקופה של עד 180 ימים.
 - הצגת התוצאות בהגעה לרמות התרעה על סוכר נמוך או גבוהה מוגדרות מראש (היפרגליקמיה או היפרגליקמיה).
 - התוצאות מנबאות אפשריות לך לדעת מראש **לפניהם** שתגיעו לרמות התרעה על סוכר נמוך או גבוהה מוגדרות מראש.
 - שימוש במכשיר נייד (כגון טלפון חכם) להציג קרייאות רמות הסוכר.
 - התוצאות רטט על הגוף על ידי המשדר החכם, אפילו כאשר המכשיר הנייד אינו נמצא בטוויה.
 - מספקת קריאות בטוויה 400 - 400 מ"ג/ד"ל כל 5 דקות.
 - חצי מגמה המראים האם רמות הסוכר שלך עלות או יורדות והמהירות בה הן שעשוות זאת.
 - גرافים ונתונים סטטיסטיים שמציגים את תוכאות הסוכר בעיצובים קלים להבנה.
 - משדר חכם הנitin להסירה ולטעינה.
 - יכולות הזנת אירוחים (כגון ארכוחות, פעילות גופנית או אינסולין).
 - אחסון נתונים הסוכר באפליקציה ובמשדר החכם.
 - מספקת יכולת ניטור רציף לאחרים על ידי שימוש באפליקציה NOW Eversense.

דרישות המערכת

- מערכת Eversense E3 CGM.
- טלפון חכם תואם אנדרואיד או iPad® iPod® iPhone® Apple Smart iPad® או Bluetooth Smart Bluetooth (או Apple Watch® Low Energy).
- עבור רשימת מכשירים מתאימים, אנא בקרו באתר <https://global.eversensediabetes.com/compatibility>.
- אפליקציית Eversense הורדה למכשיר הנייד שלך מ- Google Play™ או מ- Apple App Store.

הסכם רישיון עבור משתמש קצר ומדיניות פרטיות

השימוש באפליקציית Eversense כפוף לתנאים ולהתנויות של הסכם הרישיון למשתמש קצר העדכני ביוון של אפליקציית Eversense ולמדיניות הפרטיות של אפליקציית Eversense. סמכים אלו מעודכנים מעת לעת ומוצגים באתר <https://global.eversensediabetes.com>.

מכשירים פרוציים

נא לא להשתמש באפליקציות Eversense על גבי איפונים או איפודים פרוציים. מכשירים פרוציים לא מספקים רמה קבילה של אבטחה עבור המשתמש ואינם מאושרים לשימוש על-ידי Senseonics.

מסך או כפטור מקובלים

אם המסך של המכשיר הנדי שבור או שהחלצנים אינם פועלים, יתכן שלא תוכל להשתמש במערכת תחמי אירופי סוכר נמוך או גבוה. Eversense E3

שינויי מכשיר

אין לשנות את מערכת CGM-E3 Eversense עבור שימוש עם מוצרים, אביזרים או ציוד רפואי אשר לא סופק או אושר בכתב על ידי Senseonics. שינויים לא מאושרים יבטלו את אחריות המשדר שלו והם יכולים להשפיע על ביצוע המערכת.

התווית לשימוש

מערכת CGM-E3 Eversense מותאמת למדידה רציפה של רמות הסוכר בנוזל במובגרים (גיל 18 או מעל) עם סוכרת לתקופה של עד 180 ימים. מערכת זו מיועדת לשימוש במקרה להחליף מדידות רמות הסוכר בדם האציגע עבור החלטות טיפול הקשורות לסוכרת.

המערכת מיועדת:

- לספק קריאות סוכר בזמן אמיתי.
- לספק מידע על מגמת הסוכר.
- לספק תרעות לדיזי וחויזי של אפיקודות של סוכר של רמה נמוכה של סוכר בדם (היפוגליקמיה) ורמה גבוהה של סוכר בדם (היפרגליקמיה).
- לסייע בניהול הסוכרת.

ניתן לפרש נתונים היסטוריים מן המערכת על מנת לעזור בהתקנת המשך הטיפול. התקנות אלה צרכות להתבסס על המגמות והדפוסים הנצפים למשך זמן. מערכת זו מיועדת לשימוש על ידי מטופל בלבד.

מידע בטיחות בזוגע ל-MRI

ניתן לשורק מטופל בעל התקן מסווג זה בסורק בתהודה מגנטית מואוזן, סגור העומד בתנאים הבאים:

- שדה מגנטי סטטי של 1.5 טסלה או 3.0 טסלה.
- גרדיאנט שדה מרבי של 1900 גאוס/ m^2 ($\geq 19\text{T/m}$).
- קצב סיגא סגולי (SAR) ממוצע לכל הגוף, המרבי המודוח למערכת תהודה מגנטית, של 4 W/kg (רמת הפעלה מבודקת ראשונה) לפחות 15 דקoot של סריקה מתמשכת או SAR של 2 W/kg לפחות 30 דקoot של סריקה מתמשכת.

בתנאי הסריקה המוגדרים לעיל, תוצאות בדיקות לא קליניות מראות כי עלילית הטמפרטורה המרבית הצפיה להיווצר מחיישן E3 Eversense היא פחות מ- 5.4°C .

בבדיקות לא קליניות, נמצא הדמה הנגרם מהתקן מתרפרש על פני כ-72 מ"מ (2.83 אינץ') מחיישן Eversense E3 כאשר הוא נסרק בהדמיה בתדר פולס בשיטת gradient echo ובמערכת תהודה מגנטית של 3 טסלה.

חיישן E3 לא נבדק במערכות תהודה מגנטית שאין עומדות בתנאים המפורטים לעיל. חשיפת חיישן E3 לתנאי הדמייה בתהודה מגנטית שאינם עומדים בתנאים המפורטים לעיל יכולה לגרום לסיבוכים אפשריים, כגון דיזידת התקן, חימום ונזק לרקמות או קריסום (ארוזיה) דרך העור.

המשדר החכם Eversense E3 אינו בטוח לשימוש עם תהודה מגנטית ויש להסתירו לפני ביצוע הליך MRI. לפני ההתחלה של הליך MRI, אמור לצוות ה-MRI שאתה נושא חיישן ומשדר חכם Eversense E3, והתייעץ עם צוות הבריאות אשר החדר את החיישן.

LAGOS מעודכנת ביוטר של תווית מערכת-h-E3 CGM, היכנס לאתר <https://global.eversensediabetes.com>. אתה מקבל כרטיס שטל בינהומי מצוות הבריאות שלך בכל החדרת חיישן. שמור על כרטיס זה בארכף שלך לעיון.

התוויות נגד

אנשים להם יש התוויות נגד דקוסמתזון או דקוסמתזון אצטט לא ישתמשו במערכת. המשדר החכם אינו תואם להלכי הדמיה בתהודה מגנטית (MRI). על מוטופלים להימנע מהלייר MRI כאשר הם נושאים את המשדר החכם. למידע על החישון, עיין במידע הבטיחות *ל-MRI*.

מניטול או סורבייטול, כאשר הם ניתנים באופן תור ורידי, או חלק מתמיסת עורו או תמייסת דיאליזה צפקייה, עשויים להעלות את ריכוזי המניטול או הסורבייטול ולגרום לקריאות גבירות שגויות של התוצאות המוטופיקות על ידי החישון שלך. חלק מן המתיקים המלאכותיים עושים שימוש בסורבייטול, ורמות ריכוז מצריכה נורמלית חלק מן התזונה לא תשפענה על קרייאות החישון.

מה כלול בחבילה זו

ערכת המשדר החכם של E3 Eversense כוללת את הבאים:



מקור מתח

עריסת טעינה

משדר חכם E3

(ערכת המשדר החכם שלך כולל תכול תקע
לקיו המתאימים לשימוש באיזור המוקומי שלך).

כלולים בחבילה זו הם גם מדריך זה למשתמש, מדריך עיון מהיר, מדריך למשתמש עבור *Eversense DMS*, מדריך *Eversense Next Steps* וגיילין *Now* (לא מוצג).

איך להשתמש במדריך למשתמש זה

מדריך זה מתאר איך להשתמש במערכת-hCGM שלך. קרא את כל המדריך לפני השימוש במערכת.

- כל האזהרות או אמצעי האזהרות מודגשים בתיבה נפרדת.
- טיפים למשתמש יופיעו לאחר הסימן ✓.

2. הטבות וסיכוןים

2

חלק זה מתאר את היתרונות, המקרים החירגים והסיכון המשווים לשימוש במערכת E3 CGM. חלק זה מתאר את הטבות, הציפיות והסיכון המשווים לשימוש במערכת CGM E3 Eversense. מידע נוספת לבטיחות זמן בכתובת <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> (מאג'ר המידע האירופי, Eversense E3 CGM (SSCP) של מערכת EUDAMED (SSCP) בתמצית לבטיחות וביצועים) או על פי בקשה למחלקה שירות הליקוות. ה-SSCP מקושרת אל מספרי ה-IDI-IDI הבסיסיים של רכיבי מערכת Eversense E3 CGM אוטם ניתן למצוא על גבי הכריכה האחראית של מדריך זה. ה-SSCP מקושרת אל מספרי ה-IDI-IDI הבסיסיים של רכיבי מערכת Eversense E3 CGM אוטם ניתן למצוא על גבי הכריכה האחראית של מדריך זה.

ניסור סוכר רציף עוזר לניהול מחלת הסוכרת וברירת רמות הסוכר, דבר היכול לשפר את איכות החיים שלך. התוצאות הטובות ביותר יושגו כאשר יהיה בידך מידע מלא בנוגע לsicinosים ויתרונות, הליך ההחדרה, דרישות המעקב והאחריות המוטלת עליך לטיפול עצמי. אם אין לך יכול להפעיל כראוי את מערכת CGM, יש להימנע מהחדרת החישון לגוף.

מערכת CGM מודדת את רמת הסוכר בנזול בין-תאי (ISF) שנמצא בין תא הגוף. ההבדלים הפיזיולוגיים בין הנזול הבין-תאי לבין הדם בדגימות דם עשוים לאגרום להבדלים במדידות של רמת הסוכר בדם. הבדלים אלה ניכרים במיוחד כאשר מתרבצעים שינויים מהירים ברמת הסוכר בדם (כגון לאחר אכילה, קבלת מנת אינסולין או פעילות גופנית), ואצל חלק מהאנשים, במהלך הימים הראשונים לאחר ההחדרה עקב זיהום העולול להיגרם כתוצאה מהליך ההחדרה. מספר דקודות תחולופה עד שרמת הסוכר בדם מגיעה לרמת הסוכר בנזול הבין-תאי.

חשיבות: אם התסמים שלך אינם מתאימים להתרעות הסוכר ולקריאות של מערכת E3 Eversense CGM, יש לבצע בדיקת סוכר בדם מהאצבע עם מד סוכר בדם ביתי לפני ביצוע של כל החלטת טיפול.

שימוש לא נאות במערכת Eversense E3 CGM בהתאם להוראות השימוש עלול להוביל לפספוס שלך של אי-ຽרע סוכר היפוגליקמי או היפרגליקמי, דבר העולם לגורם לפציעה.

לחישון יש טבעת סיליקון שמכילה כמות קטנה של תרופה אנטי-דלקטיבית (דקסמתזון אצטט). לא נקבע אם הסיכונים המשוכרים בדרך כלל לדקסמתזון אצטט שמוזרק חלils על טבעת ההשתפה של דקסמתזון אצטט שנמצאת בתוך החישון. טבעת ההשתפה משחררת כמות קטנה של דקסמתזון אצטט כאשר החישון בא מגע עם נזלי הגוף למזער את התגובה הדלקטיבית של הגוף לחישון המוחדר. חומר הדקסמתזון אצטט בטבעת יכול גם לגרום לתופעות לוואי אחרות אשר לא נראה בעבר בזריקות. על מנת לקבל רשיימה של תופעות לוואי אפשרויות לחומר דקסמתזון אצטט, צור קשר עם הרופא שלך.

שינויים לא מורשים של הציג, גישה לא מתאימה אל המידע הנמצא בו או "פריצה" של המערכת שלך ונקיטת בפעולות אחרות שאין מושות עולאים לגרום לתפקידו לקוי של מערכת-ה CGM ועלולים להעמיד אותך בסכנה. שינויים לא מורשים של הציג אינם מותרים ואתה תabdד את האחריות שלך אם תבצע אותם.

יש לדוח ליצן ולרשויות המדינה במדינה החבורה שלכם על כל אירוע חמור שהתרחש וקשרו לשימוש בהתקן.

התראות והודעות רמות הסוכר לא תישמענה כאשר הצליל במקשר הניבד שלך מכובה. אם ל מערכת אין אפשרות להציג ערך סוכר, היא לא תוכל לספק התראות סוכר. אם אין מסוגל להרגיש את הרטט של המשדר החכם, אתה עלול גם שלא לשים לב להתרעות. יכול להיות שתצטרכ עזרה רפואיים במקרים של רמות סוכר גבוהות או נמוכות כאשר אין מודיע לך. רמות הסוכר המוחשבות על ידי המערכת עלולות להיות שונות במקרה בהשוואה למד הסוכר שלך בدم. הדבר עלול לגרום להפעלת התראה בזמן שונה מן הזמן שהוא הייתה מופעלת אם ערכי המערכת תמיד היו שווים לערכי מד הסוכר בדם.

חשיבות: אם לא תבצע מדידות בעזרת מד סוכר בדם כאשר התסמים שלך לא מתאימים לקריאות הסוכר של החישון, אתה עלול להחמיר אירוע של רמות סוכר גבוהות או נמוכות.

יש לבסס את החלטות הטיפול על ידי סקירה של הדברים הבאים: ערך סוכר הבא מן החישון, חז מגמה, גרפם גמת סוכר עדכני והתרעות/הודעות מן המערכת. אל תיקח החלטות טיפול אלא אם לקחת בחשבון את כל המידע הנ"ל. וודא שאתה מדבר עם הצוות הרפואי שלך איזות פועלות אינסולין כך שתוכל להבין איך ההשפעה שלו על הסוכר שלך יכולה להיות גורם בהחלטות הטיפול שלך.

החינוך מוחדר על ידי ביצוע של חתק קטן ומיקום החישון מתחת לעור. ההשתלה עלולה לגרום לziehom, גירוי בעור, כאב, שטף דם, שינוי צבע או דלדול של העור. במהלך המחקרים דוח על מספר קטן של מקרים סחרחוות, התעלפויות ובחילות, כמו גם על מקרים בהם החישון נשבר או שלא ניתן היה להוציאו בניסוי הראשון. בנוסף, המדבקה עלולה לגרום לתגובה או לגירוי בעור. יש לדוח לצוות הרפואי שלך על כל בעיה רפואית הקשורה להליך או לשימוש בהתקן. יהיה צורך בהlixir הסרה נוספת בסיום ח"י החישון.

ازהרות

- מערכת Eversense E3 CGM לא נבחנה על ידי שימוש במיקומי החדרה השונים מלבד החלק העליון של הדרכן.
- אם בכל זמן התסמיינים שලך לא מתאימים לקריאות הסוכר של החישון, עליך למדוד את רמת הסוכר שלך בדם.
- לפני כל החלטת טיפול, עליך לקחת בחשבון את ערך הסוכר המגיע מן החישון, את גוף המגמה, את חץ המגמה וככל התרעה המגעה ממערכת ה-CGM-Eversense. אם חץ המגמה איננו מוצג, למערכת אין מספיק נתונים על מנת להציג את כיוון ושיעור השינוי. אל תיקח החלטות טיפול המתבססות רק על ערך הסוכר בחישון.
- אם נגרם נזק למשדר החכם או שהוא נסדק, אל תשתמש בו, לאחר מכן שהמשדר עלול ליצור סכנת בטיחות חשמלית או לתקלה במכשיר שעולאים לגורום להתחשימות.
- קרבה רבה להפרעה אלקטرومוגנטית (EMI) ישירה עלולה לשבש את יכולתו של המשדר החכם לשילוח נתונים למכשיר הניד. התרחק מקור ה-EMI ובודק שהמכשיר הניד שלך מחובר אל המשדר החכם שלך.
- תרופות אנטיביוטיות מסווג טריציקליין עלולות להויריד באופן שניי את קריאות הסוכר של החישון. אל תתבוסס על קריאות הסוכר בחישון כאשר אתה נוטל טריציקליין.
- על התחבושת להישאר ולכוסות את החתרן במשך 48 שעות לפחות הטיפול הסטנדרטי על מנת לאפשר יצירה של אטם עמיד במים בכדי לסיע בהגנה מפני דלקות. עד להחלמה, כסה תמיד את מיקום החדרה בתחבושת סטרילית לפני הנחת הדבק של המשדר החכם על החישון. אם לא תעשה זאת, עלולה להתפתח דלקת באתר ההחדרה.
- עיין במדריך למשתמש זה ייחד עם הוצאות הרפואית שלך. למידע נוסף ואיתור טיפול בעויפות הנוגעות למוצר Eversense E3, צור קשר עם מחלקת שירות לקוחות טלפון 844-SENSE4U-736-7348 (844-736-7348). אם אתה נמצא מחוץ לארה"ב, צור קשר עם המפיצ' המקומי או בקר באתר <https://global.eversensediabetes.com>
- כדי תמיד את המערכת באמצעות דגימות דם מהאצבע. אין להשתמש בקריאת סוכר בדם מאתר חלופי (לדוגמה, האמה או כרית כף היד) לכיוול המערכת.

ازהרות (המשך)

- אין להחדיר את ערכות העירוי או להזריק אינסולין בטוויה של 10.16 ס"מ (4 אינץ') מאתר החישון. אם אתר הזרקת האינסולין נמצא בטוויה של 10.16 ס"מ (4 אינץ') מאתר החישון, הוא עלול לשבש את קריאות הסוכר מהחישון ולגרום לקריאות סוכר לא מדויקות.
- פעל תמיד בהתאם להוראות הטיפול של הרופא לאחר החדרה או הסרה של החישון. פנה לרופא שלך במקרה שהוא האירועים הבאים יתרחשו:
 - אם יש לך כאבים, אדמומיות או נפיחות במקום החתך יותר מ-5 ימים לאחר ההחדרה או ההוצאה של החישון, או אם החתך לא החלים תוך 5 עד 7 ימים.
- אם קריית סוכר בחישון היא מאוד נזוכה (מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל) או מאוד גבוהה (מעל ל-400 מ"ג/ד"ל), עליך לבצע בדיקת סוכר בدم מהאצבע לפני ביצוע של כל החלטת טיפול.
- מערכת CGM E3 CGM דורשת ציול על מנת לספק קריאות מדויקות. אל תשתמש בקריאות CGM על מנת לבצע החלטות טיפול אלא אם כן עקבת אחר ההוראות לכיוון יומי.
- מערכת CGM E3 CGM לא תספק קריאות במהלך תקופת החימום בת 24 שעות ועד לאחר ציול שני מוצלח במהלך שלב האתחול. במהלך תקופה זו, עליך לנטר את הסוכר שלך על ידי שימוש בדם סוכר בדם.
- התreuות ותנאים מסוימים ימנעו את תצוגת נתונים הסוכר. במהלך תקופות אלו, עליך להשתמש במיד סוכר ביתי בדם על מנת לבצע החלטות טיפול. עליך לקרוא בזיהירות את חלק התתרעת וההודעות בתוך מדריך למשתמש במערכת Eversense E3 CGM על מנת להבין תנאים אלו.
- התreuות והודעות רמות הסוכר לא תישמענה כאשר הצליל במכשיר הנייד שלך מכובה. אם למכשיר אין אפשרות להציג ערך סוכר, היא לא תוכל לספק התreuות סוכר. אם אין מסוגל להרגיש את הרטט של המshedר החכם, אתה עלול גם שלא לשים לב להתרעות.
- כאשר המshedר החכם לא נישא מעל לחישון, כגון בזמן טינה, מערכת CGM E3 CGM לא תספק התreuות והודעות אל המכשיר הנייד או באמצעות התreuות רטט מן המshedר החכם.

אמצעי זהירות

- אין להחליף מדרים חכמים עם אדם אחר. כל מדר חכם יכול להתחבר לחישן אחד בכל פעם. במערכות זו ישמש אדם יחיד בסביבה ביתית.
- הפרוצדורות או הטיפולים הרפואיים הבאים עלולים לגרום נזק לצמימות לחישן, במיוחד כאשר נעשה בהם שימוש בסמיכות למכשיר:
 - שימוש באולטרה-סאונד לשם ריסוק אברים – השימוש באולטרה-סאונד לשם ריסוק אברים אינו מומלץ לאנשים להם מוחדר החישן בגלל שההשפעות אינן ידועות.
 - דיאטרמיה – אין להשתמש בדיאטרמיה על אנשים להם מוחדר החישן. אנרגיה מן הדיאטרמיה יכולה לעبور דרך החישן ולגרום לנזק לזרמות במיקום ההחדרה.
 - צריבה חשמלית – השימוש בצריבה חשמלית ליד החישן המוחדר עלול לגרום נזק למכשיר. נא לא להשתמש בצריבה חשמלית ליד החישן.
- שימוש בסטרואדים – לא נקבע האם הסיכון הכרוך בדרך כלל עם הזרקת דקסומתזון אצטט נכון גם לגבי השימוש בדקסומתזון אצטט בטבעת הנמצאת בחישן, התקן לשחרור מבוקר עם רמת התאמת גבוהה. טבעת חומר הדקסומתזון אצטט עלולה לגרום לתופעות לוואי לא רשות או אשר לא נראו בעבר.
- אין ללבוש את המדר החכם במהלך סריקות רנטגן או טומוגרפיה ממוחשבת (CT). כדי למנוע שיבוש של התוצאות, יש להסיר את המדר החכם לפני ביצוע סריקות רנטגן או CT רפואיות. יש לוודא שהוצאות הרפואי מודע למדר החכם.
- יש לקשר את החישן אל המדר החכם ביום החדרת החישן. אי קישור החישן למדר החכם עלול לגרום לעיכוב בקבלת קריאות הסוכר.
- אם החישן או המדר החכם מרגשים חמים, הסר מיד את המדר החכם וצור קשר עם הצוות הרפואי של המשר טיפול. חישן חם עלול להצביע על דיזוהם או תפוקד לקוי של החישן.
- אל תנסה להשתמש באפליקציית Eversense בעת תפעול רכב ממונע.
- אין לקבל טיפול רפואי בעיסוי בסמיכות לאתר החדרת החישן. טיפול רפואי בעיסוי בסמיכות לאתר החישן עלול לגרום לאי נוחות או לגירוי בעור.

אמצעי זהירות (המשך)

- השתמש רק בשנאי מתחüber הזרם החלווי ובכבל-h USB המספקים עם המשדר החכם בעת טעינת סוללה המשדר החכם. שימוש במקור מתח אחר עלול לגרום למשדר החכם נזק שימנע קבלת תקינה של קריאות הסוכר, ואף עלול לגרום לביטול האחוריות.
- אם יש לך חששות לגבי תגובהות אלרגיות למוצריים דבוקים המכילים סיליקון, צור קשר עם הצוות הרפואי שלך לפני השימוש. זורק את המדקקה הדבוקה לאחר כל שימוש של עד 24 שעות.
- אל תנסה את יחידת המידה אלא אם כן שוחחת על כך עם הצוות הרפואי שלך. השימוש ביחידת מידה לא נכון עלול לגרום לפספסות של אירוע סוכר גבוה או נמוך.
- הזרנה של ערכי סוכר לא נכון במהלך היכיל עלולה לגרום לקריאות סוכר בחישון לא נכון, דבר העולם לגרום לרופסוס אירוע סוכר גבוה או נמוך.
- עקב אחר המלצות הצוות הרפואי שלך בעת הגדרת התרעות הסוכר שלך. הגדרות לא נכוןות של התרעות סוכר עלולות לגרום לרופסוס אירוע סוכר גבוה או נמוך.
- עליך לשים לב אל התרעות הסוכר אותן המערכת מספקת. תגובה לא נכוןות אל התרעות סוכר עלולה לגרום לרופסוס אירוע סוכר גבוה או נמוך.
- אפליקציית-h NOW Eversense לניטור מרוחק אינה מחליף את משטר הניטור הנוכחי לך על ידי הצוות הרפואי שלך.
- מערכת Eversense E3 CGM לא נסורת באוכליות הבאות: נשים בהריון או נשים מניקות, אנשים שגילם מתחת-18, אנשים חולמים או מאושפדים בבית חולים, אנשים המקבלים חומרים המדכאים את המערכת החיסונית שלהם, אנשים המקבלים כימותרפייה או טיפולים נגד קריישת הדם, אנשים בעלי התקנים מושתלים פערילים אחרים, לדוגמה, דפיברילטור מושתל (שתלים שאינם פערילים מותרים, לדוגמה, תומכי לב), אנשים בעלי אלרגיות ידועות לגלקוזומטיקוידים מערכתיים או המ משתמשים בהם (לא כולל טופיקליים, אופטימיים או אפיים, אך כולל נשאפים). דיווק המערכת לא נבחן באוכלוסיות אלו וקריאות הסוכר בחישון יכולות להיות לא מדויקות, כאשר התוצאה היא פספסות של אירוע סוכר נמוך או גבוה.
- שעון ה-iPhone הוא תצוגה משנה של נתוני-h Eversense E3 CGM ואין להשתמש בו כתחליףلتצוגה הראשונית של-h Eversense E3 CGM.

3. תחילת השימוש

3

חלק זה מתאר את שלבי הפעלה הראשונית לפני תחילת השימוש במערכת Eversense E3 CGM החדשה על בסיס יומי. תוכל לבצע שלבים אלה לפני שהוצאות הרפואית שלך יחדיר את החיבור.

על מנת להתחיל אתה צריך:

- המכשיר הנייד שלך להורדת אפליקציית Eversense.
- חיבור אלחוטי לאינטראקט.
- חיבור המשדר החכם של E3 Eversense היכולת את המשדר החכם שלך ומקור מתח.

הערה: אם עדין לא קיבלת את חיבור המשדר החכם שלך דרג להוראות ההורדה והתקינה של אפליקציית-hse Eversense אל המכשיר הנייד שלך, בהמשך חלק זה.

תוכל לבצע את שלבי הפעלה הראשונית לפני שהחיבור יוחדר, כך שתתלמד להכיר את המערכת.

שני צעדי התחלת קלים:

1. הורד את אפליקציית Eversense אל המכשיר הנייד שלך.
2. הגדר את האפליקציה – צור חשבון, קישור והגדרות.

לאחר שתקבל את המשדר החכם שלך עליך להטען אותו במלואו לפני שהוא ניתן לחברו לאפליקציה.

הערה: המשדר החכם שלך מוגדר למצב "שינה" בעת המשלוח. כאשר תטען את המשדר החכם שלך בפעם הראשונה, המצב ישנהו למצב פעיל.

המשדר החכם שלך מגיע עם אחריות ל-12 חודשים. המערכת תשלוח לך התרעה כאשר אחריות המשדר תעבור את גבול ה-365 ימים.

הטען את המשדר החכם שלך

חשוב להטען את סוללת המשדר החכם שלך בכל יום על מנת להבטיח את איסוף הנתונים מהתווך מהתווך ושליחתם אל האפליקציה. המשדר החכם אינו אוסף נתונים מן התווך או שלוח נתונים אל האפליקציה בעת הטעינה. תוכל גם להטען את המשדר החכם בחיבור כבל ה-USB ליציאת ה-USB של המחשב במקום מתאם מתח AC. טעינה מלאה של סוללת המשדר החכם באמצעות מחשב עלולה להימשך זמן רב יותר.

זהירות: השתמש בהתאם החשמל AC ובכבל ה-USB שסופקו עם המשדר החכם בלבד לצורך טעינת סוללת המשדר החכם. שימוש במקור אחר עלול לגרום למשדר החכם נזק שימוש קבלה תקינה של קריאות הסוכר, ואף עלול לגרום לביטול האחריות.

2. חיבור קצה המיקרו של כבל ה-USB אל עירית הטעינה על גבי יציאת ה-USB.




1. חיבור הקצה הסטנדרטי של כבל ה-USB אל המתאם של יציאת ה-USB.



.4. חיבור המתאים לשקע מתח AC.

- לאחר טעינה מלאה, נורת לד קטנה ירוקה תופיע בחלק העליון הקדמי של המשדר החכם (מעל לחץ הפעלה).
- ונתק את מקור המתח מן המשדר החכם לאחר טעינה מלאה.
- על מנת לשחרר את המשדר החכם מעריסת הטעינה, משורר לאחרור את הלשונית והרמת את המשדר החכם מעריסת הטעינה.

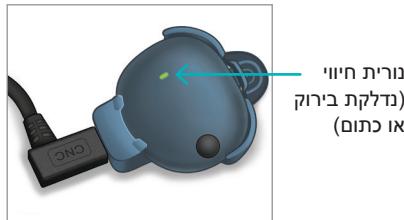

.3. התאמת ארבעת הפינים המוזהבים בחלק התיכון של המשדר החכם לאربעת הפינים המוזהבים בעрист הטעינה.

- החלק את המשדר החכם אל מקומו בעрист הטעינה.
- לאחר שמייקמת אותו, לחץ על המשדר החכם כלפי מטה, עד שייכנס למקוםו.




שלב 1. הורד והתקן את האפליקציה

3

האפליקציה מיועדת לפעול עם המשדר החכם כדי לקבל ולהציג באופן אוטומטי את נתוני הסוכר מהחישון.

- 3. במסך ההתקנה, לחץ על Install application (התקן אפליקצייה) ופעל בהתאם להוראות התקינה.**
לאחר 1-2 דקות, בדוק אם הסמל של אפליקציית Eversense מופיע בתצוגת המכשיר הנייד (כמפורט בצד שמאל).

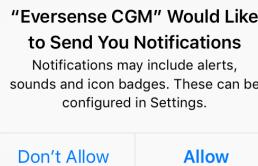

הערה: וודא שאתה מאפשר קבלת הודעות Eversense מאפליקציית התרעות והודעות בכדי לקבל התרעות והודעות אל המכשיר הנייד שלך.

- 2. הורד את אפליקציית Eversense החינמית Apple App Store או מ-Google Play.**

ההנחיות להתקנת האפליקציה במערכות הפעלה של iOS או שנות מלאה של מערכות הפעלה אנדרואיד.



סמל אפליקציית Eversense

הערה: וודא שהמכשיר הנייד שלך עושה שימוש במערכות הפעלה התואמת העדכנית ביותר. Eversense

- 1. בחר את המכשיר הנייד בו תרצה להשתמש על מנת להציג את קריאות הסוכר שלך. ברוב המקרים, זה יהיה טלפון חכם.**



חשוב: וודא שיש לך חיבור אלחוטי לאינטרנט, שהtarיך והשעה המופיעים על גבי המכשיר הנייד שלך נכונים ושה-Bluetooth מופעל לפני שימוש.


שלב 2. הגדרת האפליקציה - יצרת חשבון, קישור והגדרות

3

לאחר הורדת האפליקציה, לחבר בין האפליקציה למכשיר החכם על ידי קישור המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלך.

2. לאחר שתסכים להסכם אתה תתבקש ליצור ולרשום חשבון עם כתובת דוא"ל וסיסמה.

- עליך ליצור חשבון לפני שתוכל להיכנס למערכת. לחץ על **Create an Account** (צור חשבון).

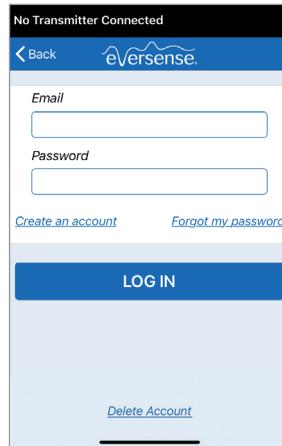

הערה: אם כבר יש לך חשבון וscpחת את הססמה שלך, תוכל לאפס אותה דרך האפליקציה.
אם scpחת את כתובת הדוא"ל המקושרת אל Main Menu > About > My החשבון, עברו אל Account (תפריט ראשי>אודות>החשבון שלי).

1. הקש על הסמל של אפליקציית Eversense במכשיר הנייד כדי להפעיל את האפליקציה.

הגירה המלאה של הסכם הרישון עבור משתמש הקצה מוצגת.

- קרא ולחץ על Accept (קביל).



Having read the Privacy Policy, clicking on the "Accept" button I provide my consent for the processing of my health-related data in order to be used by Senseonics to provide and operate the Senseonics Products and Services.

Cancel Accept


3

3. הזן את המידע הקשור לחשבון שלך ולחץ על Submit (המשך).

- **לחץ על Done (סיום) בצד ימין להחזיר אל מסך הכניסה למערכת Eversense.**

4. הזן את כתובת הדוא"ל ואת הססמה שלך ולחץ על LOG IN (היכנס). אתה תראה מסך אישור. לחץ על OK (אישור).

הערה: הססמה תלולה רישיות (הבדלים בין אות קטנה לאגדולה).

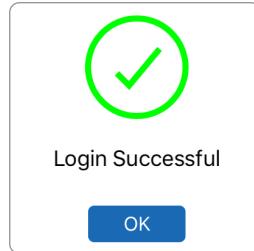A screenshot of a web browser displaying the "eversense" website. The page title is "Create New Account". It features fields for "First Name", "Last Name", "Email", and "Create a password". Below these fields are "Confirm your password" and "Next" buttons. At the bottom of the form, there is a link for users who already have an account: "Have account already? Please go to Sign In". The footer of the page includes the copyright notice "Copyright © 2022 Sensecsoft All rights reserved".

3

משתמשי אנדרואיד נדרשים לאשר שירותים מיקום.

Enable Bluetooth and Location Services

The Eversense Mobile App requires location permission to enable Bluetooth scanning and pairing with an Eversense Smart Transmitter. To receive alerts and sensor readings when the app is in use or in the background, allow location services and Bluetooth must remain enabled.

OK

- ה押し **OK** לאישור שירותים מיקום. נדרש הרשות להיבור Bluetooth.

- לאחר מכן ה押し **Allow** (הרשאה) כדי להבטיח לקבלת התראות כאשר האפליקציה נמצאת בשימוש או פועלת ברקע.


הערה: משתמשי אנדרואיד 12 OS ומעלה יכולים לראות חלון קופץ שונה עבור בקשת הרשאה.

Allow Eversense CGM to find, connect to, and determine the relative position of nearby devices?

Allow

Don't allow

5. לאחר השלמת הרישום והכניסה אל **WELCOME** המערכת, יופיע מסך **ברוחים הבאים**.

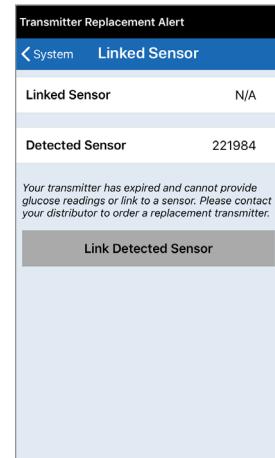

6. בחר באחת משתי האפשרויות הרלוונטיות לך:
(תלו אם יש לך או אין לך משדר חכם)

I have a Smart Transmitter

או

I do not have a Smart Transmitter


עבור לצעוד.(12)

9. החלון המוקף ב-BLUETOOTH PAIRING

REQUEST (בקשה ל קישור Bluetooth) מופיע.

- הקש Pair (קישור) על מנת להשלים את תהליך החיבור .


הערה : ניתן לחבר את המשדר החכם למכשיר נייד אחד בלבד .

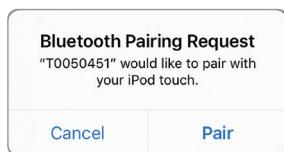

8. במסך PAIR YOUR TRANSMITTER (קיישור המשדר) , מזזה המשדר החכם שזואה על-ידי

האפקליקציה מוצג ' Not Connected ' (לא מחובר) (מספר הזיהוי של המשדר החכם שלך תואם למספר הסידורי הנמצא על החלק האחורי של המשדר החכם שלך).

- הקש (לא מחובר) על מנת להתחליל תהליך חיבור .

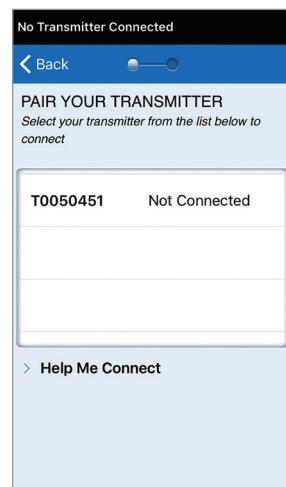

7. כאשר המשדר החכם מופעל , וכאשר מסך PAIR YOUR TRANSMITTER (קיישור המשדר) מופיע במכשיר הנייד ,

הגדיר את המשדר החכם למצב 'ניתן לגילוי ' כדי שהמכשיר הנייד יאתר את המשדר החכם :


- לחץ על לחץ הפעלה של המשדר החכם שלוש פעמים . וודא שהמשדר החכם שלך אינו מחובר למקור מתח .
- נורית החיווי תרבבב בצבעים ירוק וכחול על מנת להראות שהמשדר החכם נמצא במצב 'ניתן לגילוי '.



הערה : אם אתה לחץ על לחץ הפעלה של המשדר החכם ונורית החיווי אינה נדלקת , לחץ והחזק את לחץ הפעלה למשך כ-5 שניות על מנת להפעיל אותה .

UNIT OF MEASUREMENT . 11

- (יחידת מידה) יופיע ויצין את יחידת המידה הסטנדרטית עבור האזרור שלך. קרייאות הסוכר שלך תזגגה תמיד ביחידת מידה זו.
- לאחר אישור יחידת המידה, לחץ על **Finish** (סיום).

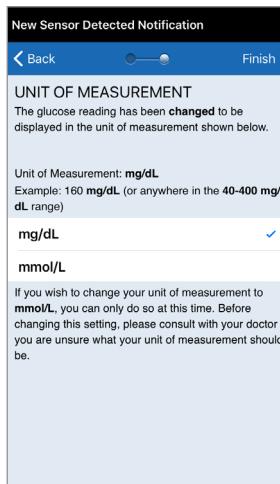


זהירות: אל תנסה לשנות יחידת המידה אלא אם כן שוחחת על כך עם הצוות הרפואי שלך.



. 10. המילה "Connected" תופיע ליד מספר

הזהוי של המשדר החכם לאחר שהחיבור הושתיים. המשדר החכם ירטוט לシリוגן עד אשר המשדר החכם יקשר לחישון המוחדר (ראה החדרה וקישור של החישון).

- לחץ על **Next** (הבא).

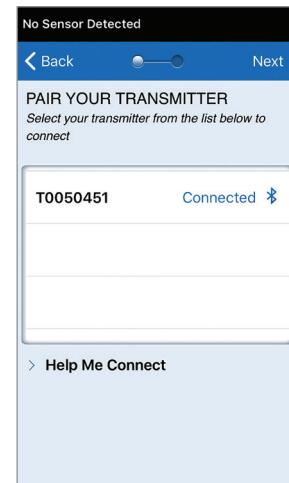

.12. לחץ דרכּ מסכי המבואה המספקים מידע אודוטה הזמן בו יש לחת החלשות טיפוליות עם מערכת .Eversense E3 CGM-

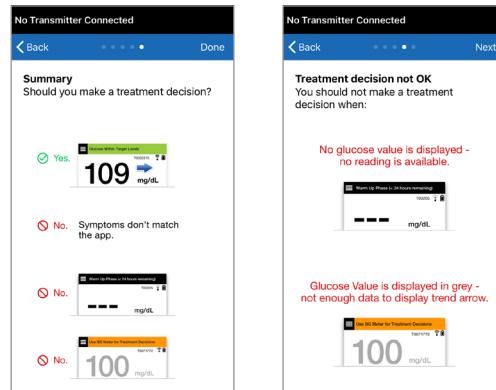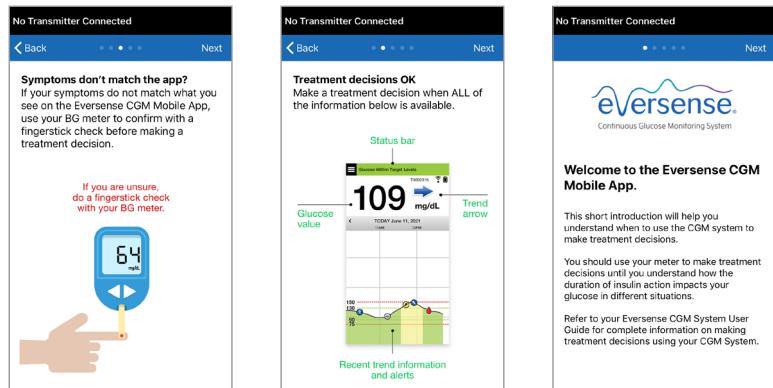

13. MY GLUCOSE מסך E. לאחר מכן, במכשיר יופיע. במסך זה לא
(הסוכר שלי) יופיע. במסך זה לא
ויצגו נתוני סוכר בשלב זה.



לאחר שהחישן יוחדר על ידי הצעות הרפואיות שלך
 ולאחר השלמת תקופת חימום של 24 שעות, אתה
 תוכל להתחילה את הכיוול. אם החישן שלך עדין לא
 הוחדר, אתה יכול לקרוא מדריך למשתמש זה על מנת
 להכיר טוב יותר את האפליקציה ואת המאפיינים שלה.

סמל החיבור של המשדר החכם

כאשר הסמל הוא טיפת דם אפורה עם X, לא אוטר כל משדר חכם. אתה תראה סמל זה לפני שתחבר את המשדר החכם שלך אל האפליקציה שלך ובכל זמן בו חיבור-ה-BLE בין המשדר החכם אל האפליקציה שלך מנותק.



כאשר הסמל הוא טיפת דם אדומה עם X, לא אוטר כל חיישן. אתה תראה סמל זה לפני שתחבר את החישין אל המשדר שלך ובכל זמן בו המשדר לא מאטיר את החישין.



כאשר הסמל הוא טיפת דם אפורה או שחורה עם קווים מעלייה, חיבור-ה-NFC בין החישין והמשדר החכם נקבע.



הקוויים מצינים את חזק האות. מידע אודוט חזק האות מוצג גם במסך Main Menu > Placement Guide (תפריט ראשי>מדריך מיקום) באפליקציית Eversense. **תזכורת:** אין יכול לחבר חיישן עד אשר המשדר שלך מחובר אל אפליקציית Eversense.



4. קישור החישון


4

חלק זה מתאר את הדרך בה יש לקשר את החישון ואת המשדר החכם בפעם הראשונה לאחר החדרת החישון על ידי הצוות הרפואי שלך. רק הצוות הרפואי שלך יוכל להחדיר את החישון. ראה חלק "אודות החישון" למידע נוסף.

לאחר שהצווות הרפואי שלך החדיר את החישון, יש לקשר בין המשדר החכם לחישון כדי להתחיל את שלב החימום **ב-24 שעות**. ניתן לקשר את המשדר החכם לחישון אחד בלבד בכל פעם. אין צורך לשאת את המשדר החכם במהלך שלב החימום.

חשוב: أنا קרא חלק זה במלואו לפני חיבור החישון שלך.

אתה יכול לחבר את החישון אל המשדר החכם בכל זמן לאחר החדרת החישון ולאחר שהמשדר החכם חובר אל אפליקציית Eversense. על מנת לקשר את החישון, על המכשיר הנייד שלך להיות מחובר אל האינטרנט ועל המשדר החכם להיות מוטען, מופעל ומקשור אל המכשיר הנייד שלך.

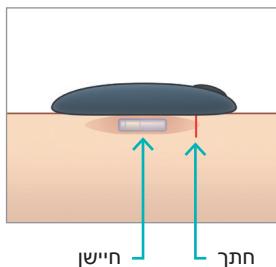

מייקום החדרה סגור באמצעות Steri Strips ומדבקה דביקה, כגון Tegaderm מונחת מעלי. חשוב להבין את הצורך בה צריך למקם את המשדר החכם מעל לחישון על מנת להבטיח את השלמת הקישור. יש להעמיד את המשדר החכם במרכזן של החישון כפי שownן לראות.

חשוב: הצוות הרפואי שלך ימלא כרטיס שטל בעת החדרה. أنا שומר על כרטיס זה בארנק שלך והחלף אותו כאשר אתה מקבל כרטיס חדש בעת כל החדרה חדשה.


1. וודא שמשדר החכם שלך מופעל (ראה השימוש במשדר החכם) ולמיכסיר הנוייד שלך יש גישה אל האינטרנט.

- מוקם את המשדר החכם ישירות על גבי


החיישן המקורי עד ש-**Placement Guide** (מדריך מקום) באפליקציה מראה על מקום מסוים ושמור על מקום זה ללא הפעלת לחץ. עמוד מדריך המיקום ממוקם ב-**Menu > Placement Guide** (תפריט < מדריך מקום).



כאשר אתה מקשר את החישין בפעם הראשונה, עם תחבותת ה-**Tegaderm™** מעל מיקום ההחדרה כנראה שהחדר נמצא במרכז ה-Tegaderm. פירושו של דבר הוא שכנהריה החישין נמצא מעל מרכז ה-Tegaderm.


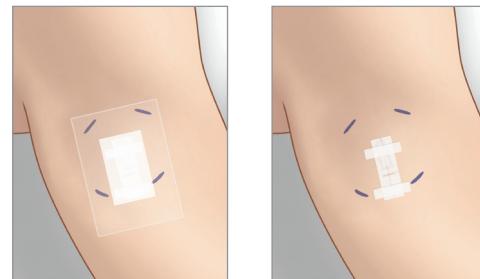


בפעם הראשונה בה אתה מקשר את החישין, אל תשתמש במדבקת ה-Eversense הדיביקה שלך על גבי המשדר החכם. בעת העמדת המשדר החכם מעל החישין, הוא צריך להיות טיפה מעל מרכז מדבקת ה-Tegaderm.

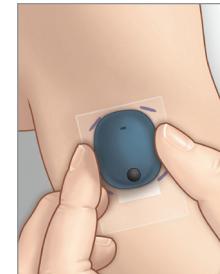

4


3. כדי לקשר בין המשדר החכם לחישון, לחץ על Link Sensor (קשר חישון) במסך המוקף New Sensor Detected (אוטר חישון חדש), או לחץ על System > Settings > System (תפריט) > הגדרות > מערכת Linked Sensor > חישון מוקשור (ולאחר מכן לחץ על Link Sensor (קשר את החישון שזוהה)).

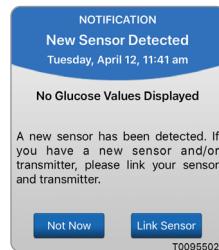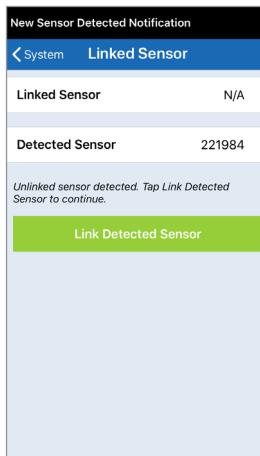


הערה: הזמן שייקח להודעה New Sensor Detected (זיהוי חישון חדש) להופיע עשוי להיות עד 5 דקות.

2. לאחר שתאשר שיש אותן, צא מדף Placement Guide (מדריך מיקום) למסך התפריט הראשי.


הערה: החיבור בין החישון והמשדר החכם רגיש לכיוון המשדר. אם המשדר החכם מונה שירות על החישון ומדריך המיקום מצין שאין חיבור, נסה לסובב מעט את המשדר החכם שמאליה או ימינה כך שהמשדר יימצא במרכז מעל לחישון באופן אנכי.

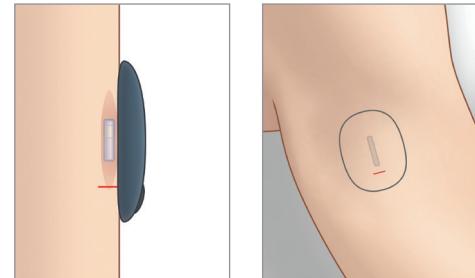

4. תהליך הקישור יתחיל. בסיום של כל שלב יוצג סימן ביקורת. התהליך עשו
להימשך עד 10 דקות עד להשלמתו. אל תדיז את המשדר החכם ממיוקם
הcheinן שלך עד אשר סימן האישור השלישי יוצג.

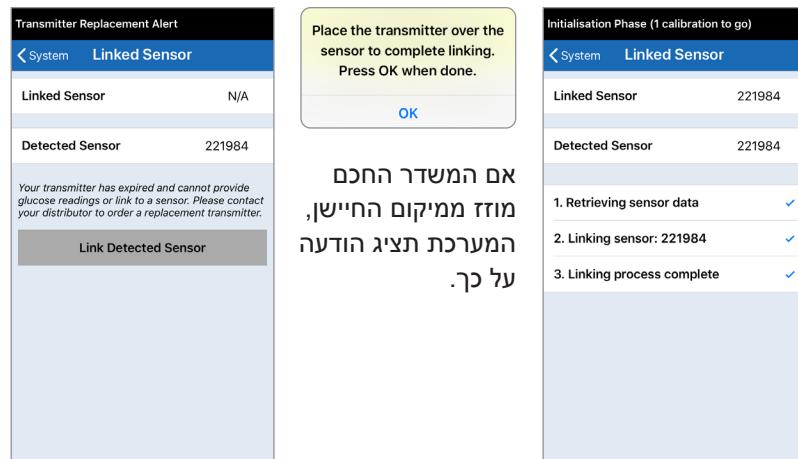

אם פג תוקפו של המשדר
החכם שלך, לא ניתן יהיה
לקשר אותו אל החeinן.

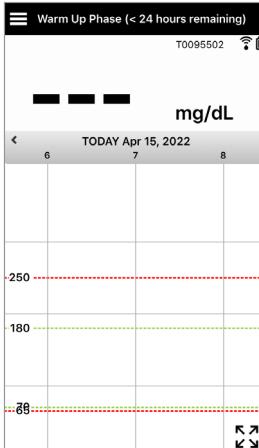


לאחר קישור החיבור, אתה יכול להסיר את המשדר החכם ולהניח אותו בעריסט הטעינה למשך 24 השעות הבאות. עיין בחלון *Using the Smart Transmitter* (השימוש במשדר החכם), ב כדי למדוד על השימוש במערכת שלך לאחר שלב החימום.

זהירות: יש לקשר בין המשדר החכם והחיבור ביום בו הוחדר החיבור. איז קישור החיבור למשדר החכם עלול לגרום לעיכוב בקבלת קריאות הסוכר.

עזרה: החיבור מצריך תקופת חימום של 24 שעות על מנת להתyiיצב בתוך הגוף שלך לפני איסוף קריאות הסוכר על ידי המשדר החכם. בעת תקופת החימום, אתה לא צריך לשאת את המשדר החכם שלך. אם תחליט לשאת את המשדר החכם מעל מיקום החיבור בתקופה זו, אתה תקבל מסר באפליקציה המראה שתתקופת החימום נמצאת בעיצומה. לאחר השלמת תקופת החימום, הפעל את המשדר החכם והנה אותו מעל לחיבור בשערת מדבקת ה-e-Trans. המערכת תבקש ממך כיוול על ידי שימוש באפליקציה.

ازהרה: מערכת ה-CGM Eversense E3 לא תספק קריאות במהלך שלב החימום במשך 24 שעות ועד לאחר כיוול שני מוצלח במהלך שלב האתחול. במהלך תקופה זו, عليك לנטר את הסוכר שלך על ידי שימוש במד סוכר בדם.

חשיבות: לאחר שלב חימום של 24 שעות, אם המשדר החכם שלך אינו מופעל ולא נישא מעל החיבור, המערכת לא תוכל לספק קריאות סוכר לאחר שלב החימום.

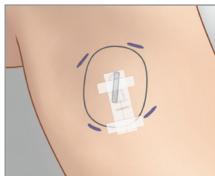


עצה: יכול להיות שהחיבור שלך לא יהיה בדוק ניצב אל החתך. אם אתה מוצא שקשה לך לקבל אות טוב או מצוץ במדריך המיקום, אין להפעיל לחץ. נסה לסובב טיפה את המשדר החכם מעלה לחיבור. המסתן כנסייה עד לרענון מדרי המיקום בין כל התאמת של עמדת המשדר החכם מעלה לחיבור.

מדריך מיקום – מסך פרטיים נוספים

Show More Detail
לחיצה על (מסך פרטיים נוספים) מציגה מתחוון חזק יותר בrzולוציה גבוהה יותר.

- הדבר יכול לעזור לך להעים נסיעה את המשדר מעל החישין.

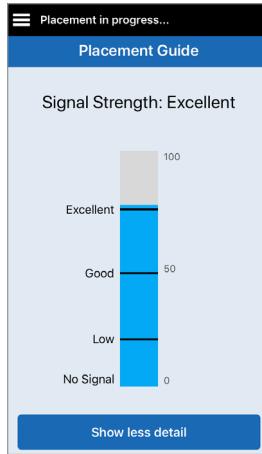

מדריך מיקום – מסך מרכזי

למטה ניתן למצוא את רמות חזק האות אותן ניתן להציג. ✓ עצה: אין צורך בחזק חיבורמצוין על מנת לחבר את החישין או להשתמש במערכת שלך.



5. נשיאת משדר יומיית

חלק זה מתאר את המאפיינים הרבים של המשדר החכם ואיך לבצע ניטור מתמשך ורץ' של רמות הסוכר שלך.

5

לאחר השלמת שלב החיבור מתחילה שלב האתחול והאתה מוכן להתחיל לשאת את המשדר החכם. בימים הראשונים, אתה תישא את המשדר החכם מעל תחבות ה-Tegaderm™. תמיד יש להתחיל עם משדר חכם אשר נתען לאחרונה. המשדר החכם שלך מתקשר גם עם החישון וגם עם האפליקציה על מנת לספק מידע של ניטור סוכר רץ' (CGM).

המשדר החכם E3 שלך מבצע את הבאות:



- מפעיל את החישון.
- מחשב ומתחסן נתונים סוכר.
- מספק התראות ברטט על הגוף במקרה שתגיע לרמות ההתרעות על סוכר שהגדרת.
- שולח נתונים סוכר אל האפליקציה דרכו Bluetooth.
- ניתן לטעינה חדש על ידי שימוש בעריסת טעינה.
- עושה שימוש ביציאת USB על גבי עрист טעינה בכדי להוריד נתונים אל אפליקציות חיצוניתות תואמות.
- בעל נורית חיוי צבעונית המUIDה על מצלבים שונים של המשדר החכם.
- מתקשר עם המכשיר הנייד.
- ניתן להפעלה או לכיבוי.

שימוש יומיומי

5

על מנת לקבל קריואות סוכר ומידע רציפים, בעת השימוש במכשיר החכם היה מודע אל הדברים הבאים:

- ✓ יש לשאת את המשדר החכם כל הזמן, למעט כאשר הוא נטعن.
- ✓ המשדר החכם עמיד למים בעומק של עד מטר אחד (3.2 רגל), במשך 30 דקות. חשיפה של המשדר החכם לתנאים מעבר לאלו שמצוין, תזיק לו ותגרום לכך לאבד את האחריות שלו.
- ✓ דודא שהמכשיר החכם יש מספיק מתח סוללה כל הזמן.
- ✓ בצע בדיקת כיון בעזרת מד סוכר בدم כאשר תתבקש לעשות זאת.
- ✓ שים לב להתראות והודעות אשר תקבל מן המשדר החכם שלאר ומהמזכיר הנני.
- ✓ החולף את המדבקה על בסיס יומי.
- ✓ ניתן להסיר את המשדר החכם מן החלק העליון של הזרוע בכל עת, אך לא בזמן הכיוון. זכור שלא נאספים נתונים כאשר המשדר החכם איננו מותקן עם החישון. כאשר אתה מニア את צידו האחורי של המשדר החכם שלא על גבי מיקום החישון, יכול להיות שתידרשנה עד ל-10 דקות על מנת שהמכשיר החכם יתקשר עם החישון, ושרירותו תתחלנה להופיע באפליקציה.
- ✓ כאשר המשדר החכם והמזכיר הנני לא נמצא באותו מתחם אחד מהשני, הנתונים הנאספים על-ידי המשדר החכם מאוחסנים ונשלחים לאפליקציה כאשר המזכיר הנני והמכשיר החכם יימצא שוב באותו טווח.
- ✓ ניתן לשאת בביטחון את החישון והמכשיר החכם כאשר עוברים דרך גלאי מתכת בשדות תעופה. בזמן טיסה, המשדר החכם יתנתק בדומה לכל מקשר Bluetooth אחר. הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות הספציפיות שקבעה חברת התעופה.
- ✓ עד אשר המשדר החכם קיבל את קריית הסוכר הראשונה שלו לאחר ההנאה על גבי החישון, שורת המצב באפליקציה יציג אוסף נתונים. אתה יכול לראות את שורת מצב זה לאחר הטעינה של המשדר החכם.

اذירה: אם המשדר החכם שלך ניזוק או סדוק, אל תשתמש בו, בגלל שינוי סכנה לתפקוד לך או סכנה חממית, דבר העולם להוביל לשוק חמלי.

הצמדת המשדר החכם לחישון שהוחדר

5


יש להצמיד את המשדר החכם לעור ישירות מעל החישון באמצעות המדבקה הדביקה החד פגמית. כל מדבקה מעוצבת כך שתוחלף בכל יום ויש לה צד נצמד אשר נצמד אל החלק האחורי של המשדר החכם וחלק נצמד מסיליקון אשר נצמד אל העור. פניו הרוור ופני השטח של המשדר החכם צריכים להיות נקיים ויבשים כדי להבטיח שהמשטחים הדבikiים של המדבקה אכן ידבקו. בימים הראשונים לאחר ההחדרה, אתה תישא את המשדר החכם מעל תחובשת-Tegaderm. השאר את תחובשת-Tegaderm במקומה לכמה זמן שהוצאות הרפואיות שלך מלאויך לך לעשות זאת. זורק מדבקות משומשות בהתאם לתקנות המקום או באזורה.

הערה: את המדבקות הדביקות תקבל מהוצאות הרפואיות שלך. מדבקות דביקות ניתנות הן בצעע ולבן והן שkopoot. המדבקות הדביקות הלבענות מחוראות, דבר המאפשר ללחות להתרחק מן המוקם. המדבקות השקופות מיועדות לשימוש במרקם בהם תרצה דיסקרטיות.

זהירות: אם יש לך חששות לגבי תגובה אלרגית לסליליקון, צור קשר עם הוצאות הרפואיות שלך לפני השימוש. זורק את המדבקה לאחר 24 שעות של שימוש.


1. קלף את הנייר האחורי עליו מופיע איור המשדר החכם E3 CGM. נסה שלא לגעת בחולק הנדבק במרכז.

- 2.** ישר את המשדר החכם אל הצד הנדבק (המרכז) של המדבקה ולחץ בחזקה על מנת להצמיד.
- יש מקום את המשדר החכם כך שצדדי פנים אל כנפי המדבקה (כמוצג).

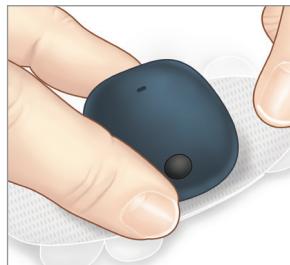

3. הסר את החלק האחורי הגדלן יותר ומקם את המשדר החכם ישירות מעל לחיבור.

- כדי להבטיח עצמתו אופטימלית, יש להניח את המשדר החכם ישירות מעל החיבור. ניתן לשפר את חזקתו גם על ידי סיבובו של המשדר החכם מעלה החיבור, מתיישר או אף אנכי תחת המשדר החכם.

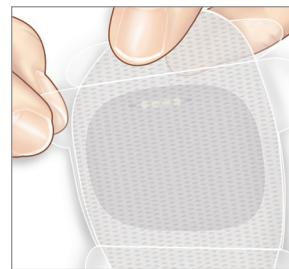

אתה תוכל לשאת את המשדר החכם מעל Eversense Tegaderm-ל לאחר שלב החימום של 24 שעות מסתויים.

4. בדוק את החיבור בין המשדר החכם והחיבור.


- Menu > Placement Guide**
- לחץ על **(תפריט < מדריך מיקום).**
- ein Placement Guide (מדרך מיקום)** בעט צירוף המשדר החכם כדי להבטיח שקיים חיבור כלשהו בין החיבור לבין המשדר החכם.



הערה: למידע נוסף אודות חזקתו העמדת המשדר, ראה **מדריך מיקום – מסך פרטיים נוספים בחלק קישור החיבור.**

5. לחץ על המדבקה בחזקה מעל לשטח העור מעל לחישן. אין להפעיל לחץ חזק ביום הראשון לאחר החדרה.


- יש למקם את המשדר החכם כר שכני המדבקה תהיינה על העור בצורה אופקית.

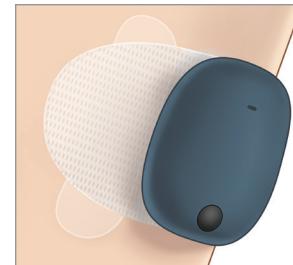

6. השתמש בלשונית על מנת לקלף את הנייר שנותר.

- חלוקת את המדבקה על גבי העור. וזאת שהמדבקה שטוחה על גבי העור.

5

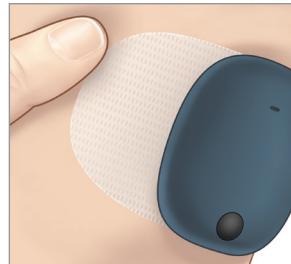

הפעל וכבה את המשדר החכם

למשדר החכם יש לחוץ הפעלה על מנת להפעיל ולכבות אותו. לחוץ הפעלה ושתי נוריות החיווי מצינים גם את רמת המתח שנותר בסוללה.

2. על מנת לכבות את המשדר, לחץ והחזק על לחוץ הפעלה למשך חמיש שניות.

- המשדר החכם יירטוט פעם אחת.
- שחרר את לחוץ הפעלה ונוריות חיווי כתומה תהבהב פעם אחת על מנת להראות שהמשדר כבוי.

1. על מנת להפעיל את המשדר, לחץ והחזק את לחוץ הפעלה למשך חמיש שניות.

- המשדר החכם יירטוט פעם אחת.
- שחרר את לחוץ הפעלה ונוריות החיווי תהבהב פעם אחת על מנת להראות שהמשדר פועל.

בכל עת, אתה יכול להחזק על לחוץ הפעלה על מנת לראות אם המשדר החכם פועל. אם נורית החיווי נדלקת, המשדר החכם פועל. אם הנורית אינה נדלקת, המשדר החכם כבוי.



טיפול ותחזוקת המשדר החכם

- שמור על המשדר החכם ועל עיריסת הטעינה נקיים (לא לכלוך הנראה לעין) ומוגנים כאשר לא נעשה בהם שימוש. בין השימושים נגב את החלק החיצוני בmetallic כדי לשמר על הnickion.
- צור קשר עם שירות הליקוחות עבור החלפת משדר אם אתה מקבל התראת שגיאת סוללה.
- טען את המשדר החכם בכל פעם שמתוך הסוללה חלש.
- השתמש אך ורק בספק הכוח הנוכחי שספק לך עם המערכת כדי לטען את סוללת המשדר החכם. שימוש בספק כוח שונה מזה שספק עליידי Senseonics עשוי לבטל את האחוריות על המשדר החכם. אין להשתמש בספק הכוח אם נגרם לו נזק בדרך כלשה.
- על מנת לנוקות את המשדר החכם שלך, העבר עליו מטלית לחאה אשר הוטבלה במים; זרוק את המטלית בהתאם לתקנות המקומיות באזרחות.
- זרוק את המשדר החכם ואת כל מרכיבי המערכת האחרים בהתאם לתקנות המקומיות באזרחות.

מחוון סוללה

ניתן לבדוק את רמת המתח בסוללה של המשדר החכם באפליקציה, או במשדר החכם עצמו.

עם האפליקציה:

- לחץ על **Menu > About > My Transmitter** (תפריט > אודות > המשדר שלי). גלול מטה אל קוו רמת הסוללה שמצוין את כמות מתח הסוללה שנوتה.
אי/
• בדוק את סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של מסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי). סמל סוללה אדום מראה שסוללת המשדר החכם ריקה.

עם המשדר החכם:

- כאשר המשדר החכם פועל, לחץ ושחרר את לחץ הפעלה. נורית החיווי תהבהב בירוק פעם אחת אם המתח בסוללה הוא לפחות 10%. מומלץ תמיד להטען את המשדר החכם טעונה מלאה של 15 דקות על ידי שימוש בשקע קיר על מנת להבטיח טעינה מלאה. למידע נוסף על מורות החיווי, עיין בדף הבא

מחווני מצב נוריות חיוי

המשדר החכם מציג כמה מצבים שונים בהתאם על צבע נורית החיווי.

• בעת השימוש במשדר החכם:

5

פעולה	צבע	צבע נורית חיוי
קשר את המשדר החכם למיכיר נייד	צבע ניתן לגילוי	אור ירוק וכטום מתחלף כאשר מתבצעות 3 לחיצות על לחץ ההפעלה בתוך 5 שניות
לחץ וחזק את לחץ הפעלה לכ-5 שניות על מנת להפעיל	המשדר החכם כבוי	לא מבהב בעת לחיצה על לחץ ההפעלה
לא נדרשת פעולה מידית	עוצמת סוללה של 90% - 10%	הנורית מהבבבת בירוק (פעם אחת) כאשר לחץ הפעלה נלחץ
טען את הסוללה בהקדם	מתוך סוללה נמוך, פחות מ-10%	הנורית מהבבבת בכטום (פעם אחת) כאשר לחץ הפעלה נלחץ
בדוק את האפליקציה על גיב המיכיר הנידי שלך על מנת להבין את התרעעה	ישנה התרעעה	נורית החיווי כתומה למשך דקה אחת

• בעת טעינת המשדר החכם:

פעולה	צבע סוללה	צבע נורית חיוי
טען במשר 15 דקות לפני שתנתק את המשדר מספק הכוח	טעונה 0% - 65%	כטום מלא או מבהב בעת חיבור לכבל ה- USB
טען במשר 15 דקות לפני שתנתק את המשדר מספק הכוח	טעונה 65% - 100%	ירוק מלא בעת חיבור לכבל ה- USB

6. כוֹל המִעְרָכָת

חלק זה מתאר את תהליך וזמן כוֹל של מערכת Eversense E3 CGM שלך.

אזהרה: אין להשתמש באתרי בדיקה חלופיים, לדוגמה, האמה, בעת הזרת ערכו סוכר בدم לצורך כוֹל.

6

כדי להבטיח ביצועים מיטבים, נדרש כוֹל שגרתי, באמצעות קריאות דגימות דם מהאצבע ממד סוכר בדם. ניתן להשתמש בכל מד סוכר בדם זמן עברו הכוֹל. לאחר שהחישון הוחדר ומקושר למשדר החכם, המערכת תתחיל תקופת חיים של 24 שעות. אין צורך בכוֹל במהלך תקופה זו.


ישנם שלושה שלבי כוֹל:

שלב אתחול – לאחר תקופת החיים הנמשכת 24 שעות, עליך להשלים 4 בדיקות כוֹל בעזרת דם מהאצבע, במשך 12 שעות.

שלב 2 כוֹלים יומיים – לאחר שלב האתחול, יש לבצע בדיקת כוֹל באמצעות דגימת דם מהאצבע מדי 12 שעות לפחות לפחות 21 ימים.

שלב 1 כוֹל יומי – המערכת תאזר אם יש צורך בכוֹל אחד או שני כוֹלים יומיים ותתריע אותך בנוגע לכך. במהלך שלב כוֹל יומי, יש לבצע בדיקת כוֹל באמצעות דגימת דם מהאצבע מדי 24 שעות.

לאחר 21 הימים הראשונים, המערכת תידע אותך אם יש צורך בכוֹל אחד או שני כוֹלים יומיים.

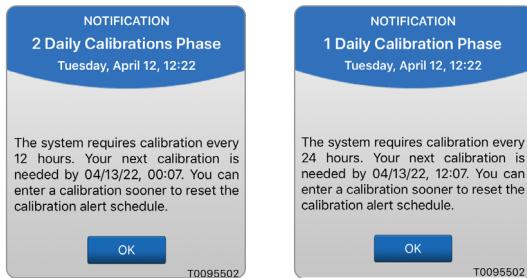

ازהרה: במהלך שלב 2 כיולים יומיים מערכת Eversense E3 CGM דורשת כיוול מדי 12 שעות על מנת לספק קריאות מדיקות. במהלך שלב 1 כיוול יומי מערכות Eversense E3 CGM דורשת כיוול מדי 24 שעות. אל תשתמש בקריאות CGM על מנת לבצע החלטות טיפול אלא אם כן עקבת אחר הוראות לכיוול יומי.

הכיוול השגרתי הוא בעל חשיבות רבה על מנת להבטיח את הביצועים הטובים ביותר של מערכת Eversense E3 CGM. העצות הבאות יכולות לעזור לך לשפר את מדדיות הכיוול שלך:

עצות להבטחת כיוול טוב:

- ✓ בוצע את הכיוול בזמןים בהם רמת הסוכר איננה משתנה באופן מהיר (לדוגמה, לפני ארוחות, לפני מתן של אינסולין).
- ✓ בוצע את הכיוול בזמןים בהם אתה יודע שלא תסיר את המשדר החכם במהלך 15 הדקות הבאות.
- ✓ שטוף את הידיים במים חמימים וובון ונגב אותםabisodium לפני הבדיקה ממד סוכר בدم. חשוב מאוד שהידיים תהוו נקיים ויבשottiות בעת בדיקת הסוכר בדם.
- ✓ מלא תמיד אחר הוראות היצרן של מד הסוכר בדם על מנת לקבל קריאות מדיקות של רמת הסוכר בדם עברו הכוון.
- ✓ ודא שהקוד שעלה בקובוקון של מקלוני הבדיקה תואם לקוד של מד הסוכר בדם (אם נדרש קידוד).

הכיוול לא יושלם או שההוראות לא תתקבלנה אם:

- ✗ קריית מד הסוכר בדם נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל.
- ✗ קריית מד הסוכר בדם גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.
- ✗ קריית מד הסוכר בדם נלקחה יותר מ-10 דקות לפני החננת התוצאה באפקטיבית Eversense.
- ✗ קריית הסוכר של החישון שונה באופן נסובן מהתוצאות המוקדמות של הסוכר בדם.
- ✗ המשדר החכם שלר הוסר או שהוא לא היה יכול לאסוף נתונים סוכר במהלך 15 הדקות שלאחר החננה של ערך הכוון שלך.

שלבי כיול

א. שלב אתחול (לאחר תקופת חיים של 24 שעות)

בשלב זה נחוצות 4 בדיקות כיול בעזרת דם מהאצבע.

- 4 בדיקות הcioł תבוצענה במרוחים של שעתיים עד 12 שעות וכל 4 הבדיקות תתבצענה במהלך תקופה של 36 שעות. לאחר 8 שעות ללא אזהנה שלcioł, נתוני הסוכר לא ייצגו.
 - cioł הראשון = 24 שעות לאחר קיושו החישון.
 - cioł השני = שעתיים עד 12 שעות לאחר cioł המוצלח הראשון.
 - cioł השלישי = שעתיים עד 12 שעות לאחר cioł המוצלח השני.
 - cioł הרביעי = שעתיים עד 12 שעות לאחר cioł המוצלח השלישי.
- קריאות הסוכר תחלנה להיות מזוגות באפקצייה כמו דקוט לאחר ההשלמה המוצלחת שלcioł השני.

חשיבות: אם המשדר החכם שלר אינו מופעל ואיןנו מחובר אל אפקציית Eversense ואל החישון, המערכת לא תוכל לבקש ממך לכיוול.

כניסה מחדש לשלב האתחול

הדברים הבאים יגרמו למערכת להיכנס מחדש מחדש אל שלב האתחול.

- אי השלמה של בדיקתcioł במהלך 12 שעות כחלק משלב האתחול.
- אי השלמה של 4 בדיקותcioł במהלך 36 שעות כחלק משלב האתחול.
- אי השלמה של אזהנותcioł הנדרשות במהלך שלב cioł היומי.
- cioł אחד מדי 12 שעות במהלך 21 הימים הראשונים של הנשיאה, וכל זמן בו המערכת נמצאת בשלב 2ciołים יומיים.
- cioł אחד מדי 24 שעות כל זמן בו המערכת נמצאת בשלב 1cioł יומי.
- כאשר מספר מדידות אחרונות של מד הסוכר בدم האחרונות שונות באופן משמעותי הסוכר הנקראים על ידי החישון.
- אם סוללת המשדר החכם ריקה לתקופה של יותר מ-16 שעות.
- כאשר אתה מקבל התרעת בדיקת החישון.
- שש שעות לאחר שאתה מקבל התרעת השהיית החישון.

ב. שלבי כיוֹל יומִי


ישנים שני שלבי כיוֹל יומִי.

2 שלבי כיוֹל יומִי הדרושים בדיקת מד סוכר בدم מדי 12 שעות. שלב הכיוֹל היומי מתחילה לאחר השלמה מוצלחת של שלב האתחול.

- 12 שעות לאחר הכיוֹל האחרון המוצלח שלר, המערכת תבקש ממך לבצע כיוֹל.
- אתה יכול לבחור להזין כיוֹלים בתדרות גבוהה יותר. יש להזין כיוֹלים יומיים לפחות במשך שעה אחת.
- אם אתה לא מבצע כיוֹל במהלך 16 שעות, אתה תקבל התרעה שעבר זמן הכיוֹל וקריאות סוכר לא תציגנה עד אשר יוזן ערך כיוֹל. לאחר 24 שעות ללא כיוֹל, אתה תקבל התרעת כיוֹל פג תוקף והמערכת תחזיר אותך לשלב האתחול.

1 שלב כיוֹל יומי הדרוש בדיקת מד סוכר בדם מדי 24 שעות.

- 24 שעות לאחר הכיוֹל האחרון המוצלח שלר, המערכת תבקש ממך לבצע כיוֹל.
- אתה יכול לבחור להזין כיוֹלים בתדרות גבוהה יותר. יש להזין כיוֹלים יומיים לפחות במשך שעה אחת.
- אם אתה לא מבצע כיוֹל במהלך 28 שעות, אתה תקבל התרעה שעבר זמן הכיוֹל וקריאות סוכר לא תציגנה עד אשר יוזן ערך כיוֹל. לאחר 40 שעות ללא כיוֹל, אתה תקבל התרעת כיוֹל פג תוקף והמערכת תחזיר אותך לשלב האתחול.

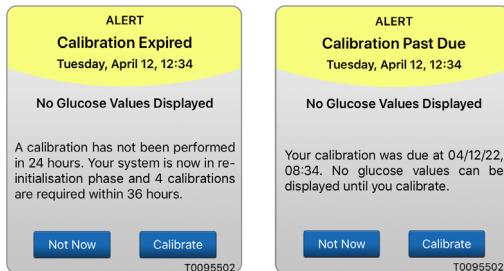

ازהרה: התרעות ותנאים מסוימים ימנעו את תצוגת נתוני הסוכר. במהלך תקופות אלו, עליך להשתמש במיד סוכר ביתי بدמך על מנת לבצע החלטות טיפול. עליך לקרוא בזיהירות את חלק ההתרעות וההודעות בתוך המדריך למשתמש על מנת להבין תנאים אלו.

6

הערה: אם ערך מוזן של ציול שונה מאוד מערך קריית סוכר אשר בוצע על ידי המערכת, אתה תקבל הודעה כייל עכשווי כשעה אחת לאחר מכן. התרעת כייל עכשווי תציג 11 עד 12 שעות לאחר מכן, ללא קשר לשלב הциיל היומי בו נמצאת המערכת. במקרה זה, אם לא תבצע ציול תוך 16 שעות, קריאות הסוכר לא תציגנה. לאחר 24 שעות ללא ציול, המערכת תחזיר אל שלב האתחול.

ażherah: כיל תמיד את המערכת באמצעות דגימות דם מהאצבע. אין להשתמש בקריאת סוכר בדם מאוחר חלופי (לדוגמה, האמה או קרית כף היד) לכילו המערכת.

הערה: אתה יכול להזין קריאות כיל נוספים אם המרווח בין כל כיל הוא לפחות שעה אחת.

1. **אתה יכול להזין את ערך הכיל על ידי לחיצה על Calibrate Now (כיל) מן התפריט הראשי או מהתוך התeruleת או הודעת כיל עכשוי.**

The image displays three screenshots of the Eversense E3 CGM mobile application interface. The left screenshot shows the 'Glucose Within Target Levels' screen, which includes fields for 'Time' (14:05), 'Glucose', 'Notes', and 'Current Phase' (2 Daily Calibrations). It also shows 'Next Scheduled Calibration Time' (Tomorrow 00:27) and 'Days Since Insertion: 4'. The middle screenshot shows a 'NOTIFICATION' box with the heading 'Calibrate Now' and the date 'Tuesday, April 12, 11:47 am'. It contains the message 'Your calibration is due. Please perform a fingerstick blood glucose meter calibration now.' with 'Not Now' and 'Calibrate' buttons. The right screenshot shows the main menu with a profile picture of 'Joe Smith' and various options: My Glucose (highlighted in blue), Calibrate, Alert History, Event Log, Reports, Share My Data, Placement Guide, Connect, and Settings. The 'Calibrate' option is also present in the main menu.

6

Glucose Within Target Levels

Calibrate Submit

Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.

Time	14:06 >
Glucose	105 mg/dL >
Notes	>
Cancel	Glucose Done
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	

Glucose Within Target Levels

Calibrate Submit

Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.

Time	14:05 >
Glucose	>
Notes	>
Current Phase	2 Daily Calibrations
Next Scheduled Calibration Time	
Tomorrow 00:27	
Days Since Insertion: 4	
> Calibration Tips	

הערה: אתה לא יכול להזין ערך CiOL אשר בוצע לפני יותר מ-10 דקות.

2. קבל קריאה של דגימת דם מהאצבע ממד הסוכר בدم שלך.



MY GLUCOSE .6


(הטוכר שלוי) יופיע עם סמל טיפת דם אפורה כדי לזהות את הכיוול במאצעות דגימות דם מהאכבע.

- טיפת הדם תהפוך לאדומה כאשר ערך הכיוול יתקבל.



CALIBRATION IN PROGRESS (מתבצע)


- כיוול) יופיע.
• לחץ על OK (אישור).

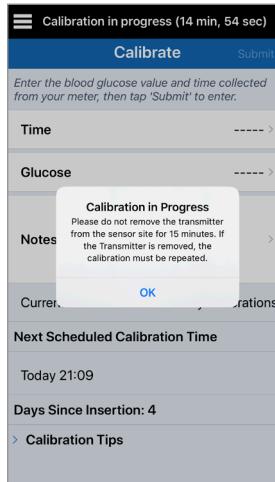

4. מ McGr CALIBRATE (כיוול)

מראה כעת הזמן ואת קריית הטוכר שהזנת. אם הנתונים לא נכונים, חזר על שלב 3.

- כasher הנתונים יהיו נכונים, לחץ על Submit (המשך).

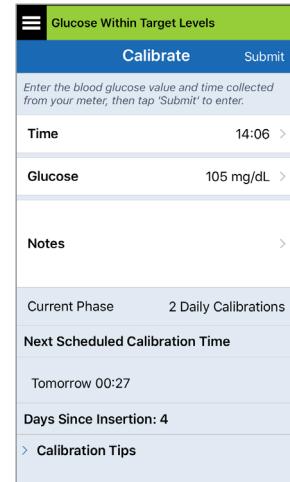

חשיבות: אין להסיר את המדריך החכם מעל החישון במשך 5 דקות לפחות לפני הבדיקה ועד 15 דקות לאחר הבדיקה כאשר הכיוול מתבצע. תוכל לראות מתה הכויל הושלם בשורת המצב בחלק העליון של המ McGr. אם המדריך החכם הוסר לפני סיום הבדיקה, אתה תटבוקש לבצע כיוול חוזר.

כבעי סמל הכיוול מראים את מצב ערך הכיוול המזון שלו. ראה טבלה למטה.

תיאור	מצב
מצаг בזמן 15 הדקות הראשונות לאחר שה贊ת ערך כיוול. אין להסיר את המשדר במהלך זמן זה. הסמל יכואל להפוך לאודם, שחור או כחול כאשר כבר לא מתבצע כיוול.	מתבצע כיוול
מצаг לאחר 15 הדקות הראשונות אם הכוול התקבל.	הכוול התקבל
מצאג כאשר המשדר מסור מעל לחישון במהלך 15 דקות בהן מתבצע הכוול. יהיה צורך ערך כיוול חדש.	כיוול לא הושלם
מצאג אם ערך הכוול המזון נמור מ-40 מ"ג/ד"ל או גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל. הערך המזון ישמר כערך מד סוכר בدم. כייל שוב כאשר ערך מד הסוכר בדם הוא בין 40 מ"ג/ד"ל ובין 400 מ"ג/ד"ל.	לא ניתן להשתמש בכיוול
מצאג כאשר ערך ידייני של סוכר בדם מזון באמצעוות יומן האירועים.	ההזנת אירוע סוכר בדם

הערה: ייתכן שייהיו תנאים בהם תוצאה הכוול שלך לא תתקבל.

הכוול לא יתתקבל אם:

- ✗ קריית מד הסוכר בדם נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל.
- ✗ קריית מד הסוכר בדם גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.

Calibration Cannot be Used
Blood glucose values more than 400 mg/dL cannot be used for calibration.
Please take appropriate action and calibrate again when glucose is between 40 and 400 mg/dL. This entry will be logged as a BG entry.

OK

✗ המשדר הוחכם שלך חוסר או שהוא לא היה יכול לאסוף נתונים סוכר במהלך 15 הדקות שלאחר ההזנה של ערך הכוול שלך.

7. השימוש באפליקציה

7

חלק זה מתאר את אפליקציית Eversense כולל את המסר הראשי, גרפ המגמה, חצי המגמה ואת מסך התפריט.

האפליקציה מנהלת תקשורת עם המשדר החכם לקבלת והציג של נתוני הסוכר, המגמות, הגרפים והתרעות.

האפליקציה גם מתחסנת את ההיסטוריה הסוכר שלך לתקופה של עד 90 ימים.


הערה: אם אתה יוצא מאפליקציית Eversense, המשדר החכם שלך לא ישלח יותר נתונים סוכר לאפליקציה עד אשר תיכנס אליה שוב.

מסך MY GLUCOSE (הסוכר שלך) מעניק לך גישה מהירה אל:

- מדידות בזמן אמת של רמות הסוכר בעזרת החישון.
- שיעור וכיוון שינוי רמות הסוכר שלך.
- מגמות גרפיות של רמות הסוכר שלך.
- התרעות (היפוגליקמיה או היפרגליקמיה).
- אירועים כגון ארכחות, פעילות גופנית ותרופות.

הערה: חיבור אינטרנט אלחוטי דרוש על מנת להוריד או לעדכן את אפליקציית Eversense.


ניהול חשבון Eversense

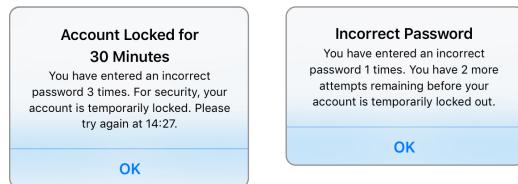


למטרות בטיחות, אם אתה מזין ססמה שגוייה שלוש פעמים עוקבות באפליקציה, החשבון שלך יינעל למשך 30 דקות. במהלך זמן זה, לא תהיה לך גישה אל נתוני ה-CGM שלך המנותרים מרוחק.

זהירות: אם אין לך גישה אל נתוני ה-CGM שלך, עליך לנטר את הסוכר שלך על ידי שימוש במד סוכר בדף.

7

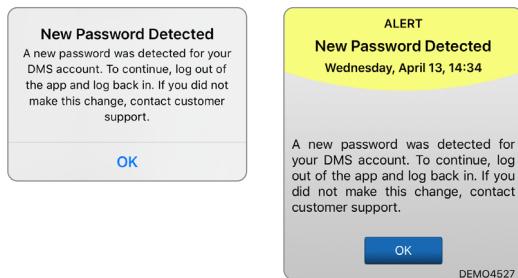

אם תנסה את ססמת חשבון ה-Eversense למערכת DMS או מעמוד שינוי הססמה ב-DMS, עליך לצאת מתוך אפליקציית Eversense ולהיכנס שוב אל המערכת על ידי שימוש בססמה החדשת שלך. אם הססמאות אינן מתאימות, אפליקציית Eversense תודיע לך על כך וכיידע אותך שחלק מן המאפיינים אינם זמינים, כולל סנכרון הנתונים אל תוך חשבון DMS שלך, וחוסר יכולת להוסף משתמשי Eversense NOW למאגר שלך, וחוסר יכולת לבצע שינויים בתמונה הפרופיל שלך.

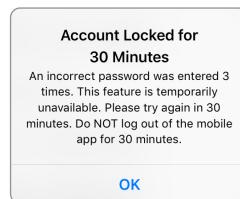

אם ה;zנת ססמה שגוייה שלוש פעמים בעמוד ה-login של מערכת DMS שלך, חלק ממאפייני האפליקציה יכולים שלא להיות זמינים במשך 30 דקות, כולל סנכרון הנתונים אל תוך חשבון DMS שלך, וחוסר יכולת להוסיף משתמשי Eversense NOW למאגר שלך, וחוסר יכולת לבצע שינויים בתמונה הפרופיל שלך. אין לצאת מן המערכת במהלך זמן זה.

בדיקות הדרגות המכשיר הנייד שלך

כדי להשתמש במערכת CGM E3 Eversense, תזדקק למכשיר נייד (לדוגמה, טלפון חכם). חשוב מאוד שהדרגות המכשיר הנייד שלך נוכנות על מנת להבטיח תצוגה מדויקת של נתוני הסוכר באפליקציה. פועל בהתאם להוראות היצרן של המכשיר הנייד להגדרת הנתונים הבאים:

- שעיה ותארי.
- Bluetooth פועל (פתוח).
- הודעות פעולות.
- הסוללה טעונה.
- אזור גאוגרפי.
- שפה.
- המכשיר הנייד לא צריך להיות במצב רטט.
- מצב 'נא לא להפריע' צריך להיות כבוי, חלק מן האפליקציות DELETEagan מצב נהייה, עלילות להפעיל באופן אוטומטי את מצב 'נא לא להפריע'. אנא עיין במדריך ההוראות עבור המכשיר הנייד שלך למידע נוסף.
- אם המכשיר הנייד שלך נמצא במצב 'נא לא להפריע', אתה לא תוכל לשמעו הודעות המגיעות מאפליקציה*. *Eversense

*עבור iOS או מעל, ואנדרואיד 6 ומעלה, אתה יכול לאפשר להתרעות הסוכר הנמכרות ולהתרעות הסוכר הנמכרות שלא נמצאות בטוחה של אפליקציית Eversense לעברך מעל להגדרות הצליל של הטלפון שלך. ראה הגדרות צליל למידע נוסף.

הCRT מסך "My Glucose" (הסוכר שלי)

מסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי) הוא מסך התצוגה העיקרי של האפליקציה. הוא מציג מגוון נתונים, כולל קריואוט הסוכר מהחישון, חצים המציגים את הכוון והקצב של השינוי, גראף מגמה, אירועים, כוילים, התרעות והודעות.

7



לפני כל החלטת טיפול, עליך לנקות בחשבון את ערך הסוכר המגיעה מן החישון, את גראף המגמה, את חץ המגמה וכל התרעעה המגיעה ממערכת ה-CGM-Eversense E3 CGM. אם חץ המגמה אינו מוצג, המערכת אין מספיק נתונים על מנת להציג את כיוון ושיעור השינוי. אתה לא יכול לנקות החלטות טיפול המתבססות רק על ערך הסוכר בחישון.

הערה:

- אתה יכול לראות צילום של המידע המגיע מאפליקציית Eversense על גבי מכשירי ה-iOS או האנדרואיד שלך. למידע בנוגע לניהול היידג'טים, עיין במדריך למשתמש עבור המכשיר הנייד שלך.
- ניתן להציג את מסך **MY GLUCOSE** (הטוכר שלו) לרוחב כדי לגשת אל לחצני קיזור להציגת 7, 14, 30 או 90 ימים, ונitin לשלוות תצוגה זו בדוא"ל בהקשה אחת.

7

שורת מצב	מספר דיזיוי עבור המשדר החכם
מספק מידע חשוב אודוות רמת הסוכר הנוכחית שלך וMbps המערכת.	זהו המשדר החכם בו אתה משתמש כעת. אתה יכול לשנות את השם על ידי הקשה על System > Settings (הגדרות>מערכת).
קריאה סוכר נוכחות	רמת סוכר נוכחות בזמן אמת. רמה זו מתעדכנת כל 5 דקות.
תאריך ושעה	התאריך והשעה הנוכחיים. תוכל לגולש שמאלה או ימינה כדי לראות תאריכים ושעות שונים.
עוצמת סוללת המשדר החכם	מראה את המתח הנוכחי בסוללת המשדר החכם.
חיבור של המשדר החכם	מצין את עוצמת החיבור של המשדר החכם לחישון או עם המכשיר הנייד.
חץ מגמה	מציג את הכוון אליו נעות רמות הסוכר.
יחידת מידה	זהוי ייחידת המידה המשמשת לתצוגת כל נתוני הטוכר.
רמת התרעעה לרמות סוכר נמוכות/גבוהות	הרמות שהוגדרו עבור התרעות רמות הסוכר הנמוכות והגובהות.
רמת 'עד' לרמות סוכר נמוכות/גבוהות	הרמות שהוגדרו עבור 'עד' רמות הסוכר הנמוכות והגובהות (טווich עד).

<p>7</p> <p>מראת אירועים רבים שהתרחשו בו זמנית.</p> <p>מראת אירועים שהזנו באופן ידני (לדוגמא, פעילות גופנית). למידע נוסף, ראה רישום אירועים.</p> <p>מצין מצב כניסה ציול.</p> <p>רמת הסוכר לאורך זמן. תוכל לגלו אחורה וקדימה כדי לראות את המוגמות. לחצופן, תוכל להגדיל את התצוגה כדי לראות נתונים של 3 שניות או להקטין את התצוגה כדי לראות נתונים של עד 3 ימים.</p> <p>מספק ניוט מהיר לחלקים השונים של אפליקציית Eversense:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Settings (הגדרות)</td><td>Reports (דוחות)</td><td>My Glucose (הסוכר שלי)</td></tr> <tr> <td>אודות</td><td>Share My Data (שתף את הנתונים שלי)</td><td>Calibrate (כайл)</td></tr> <tr> <td></td><td>Placement Guide (מדריך מיקום)</td><td>היסטוריה (מדריך מיקום)</td></tr> <tr> <td></td><td>חבר</td><td>יום אירועים</td></tr> </tbody> </table>	Settings (הגדרות)	Reports (דוחות)	My Glucose (הסוכר שלי)	אודות	Share My Data (שתף את הנתונים שלי)	Calibrate (כайл)		Placement Guide (מדריך מיקום)	היסטוריה (מדריך מיקום)		חבר	יום אירועים	<p>סמל אירועים רבים</p> <p>סמל אירוע</p> <p>סמל ציול</p> <p>גרף מגמת רמת הסוכר</p> <p>תפריט</p>
Settings (הגדרות)	Reports (דוחות)	My Glucose (הסוכר שלי)											
אודות	Share My Data (שתף את הנתונים שלי)	Calibrate (כайл)											
	Placement Guide (מדריך מיקום)	היסטוריה (מדריך מיקום)											
	חבר	יום אירועים											

חצ'י מגמה

ישנים 5 חצ'י מגמה שונים המראים את הכיוון הנוכחי של רמות הסוכר שלך, ואת המהירות בה הן משתנות.

7

עליה או ירידה הדרגתית של רמות סוכר, הנופלות או עולות בשיעור בין 0.0 מ"ג/ד"ל ו-1.0 מ"ג/ד"ל דקה.



עליה מתונה של רמות הסוכר, העולות בשיעור בין 1.0 מ"ג/ד"ל ו-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.



ירידה מתונה של רמות הסוכר, הנופלות בשיעור בין 1.0 מ"ג/ד"ל ו-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.



עליה מאוד מהירה של רמות הסוכר, העולות בשיעור של יותר מ-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.



ירידה מאוד מהירה של רמות הסוכר, הנופלות בשיעור של יותר מ-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.



האפקט קצהו עווה שימוש ב-20 הדקות האחוריות של ניטור רמות סוכר רציף על מנת לחשב את מגמות רמות הסוכר.

כאשר אין מספיק ערכי חישון זמינים על מנת לחשב חץ מגמה, הוא לא יוצג וערך הסוכר יהיה במצב אפור ולא במצב שחור.

לפניהם כל החלטת טיפול, עליך ללקחת בחשבון את ערך הסוכר המגיע מן החישון, את גראף המגמה, את חץ המגמה וכל התרעעה המגיעה ממurette ה-CGM-E3. אם חץ המגמה אינו מוגז, למערכת אין מספיק נתונים על מנת להציג את כיוון ושיעור השינוי. אתה לא יכול ללקחת החלטות טיפול המבוססות רק על ערך הסוכר בחישון.

להבין את החלטות הטיפול עם ה-CGM

קרא את כל המדריך למשתמש למערכת CGM E3 Eversense ושים לב שאתה מבין מתי עלי' ומתי אין עלי' לבצע החלטות טיפול על בסיס מידע מה-CGM בלבד. לפני שאתה מתחילה את השימוש ב-Eversense E3 עברו החלטות טיפול, שוחח עם איש הצוות הרפואי שלך בנוגע להבנה על הצורות בהן אוכל, אינסולין, תרופות, לחץ ופעולות גופניות ישפיעו על הסוכר שלך.

חשיבות:

- אם התסמנים שלך אינם מתאימים למידע הסוכר בחו"ש המוצג, או אם האפקטಕציה לא מציגה חן את הערך והן את חץ המגמה עבור הסוכר, השתמש במידע הסוכר שלך בדם על מנת לבצע החלטות טיפול.
- השתמש במידע הסוכר בדם שלך על מנת לבצע החלטות טיפול עד אשר תבין איך Eversense E3 עובדת בשבייה. הדבר יכול לקחת ימים, שבועות או אפילו חודשים עד שתתרגישי בכך להשתמש בתנתוני ה-CGM שלך עבור החלטות טיפול.

7

קח את הזמן שלך ומלא אחר המלצות איש הצוות הרפואי שלך לגבי הזמן בו יש להשתמש ב-E3 Eversense במקום במידע הסוכר בדם שלך.

רמת סוכר מהচישון ורמת סוכר בדם

הסוכר בחו"ש נמדד בנוול הבין-תאי, לא בדם. בגלל עבודה זו, רמות הסוכר בחו"ש עלולות להיות בעיכוב אחר רמות הסוכר בדם. לדוגמה, כאשר חץ מגמת ה-CGM שלך מראה ירידת סוכר מאוד מהירה, רמת הסוכר שלך בדם עלולה להיות נמוכה יותר מן המספר המוצג; או כאשר חץ מגמת ה-CGM שלך מראה עלייה מהירה מאוד, רמת הסוכר שלך בדם עלולה להיות גבוהה יותרמן המספר המוצג דוגמאות אלו תתרחשנה בתדריות גבוהה יותר כאשר רמות הסוכר שלך משתנות במהלך היום, כגון לאחר ארוחה, לאחר מנה של אינסולין או במהלך פעילות גופנית. לחץ, מחלת ואפיון כמה מן התוצאות אותן אתה נוטל, עלולים גם הם להשפיע על הסוכר שלך. לפעמים, החלטת הטיפול הנכונה היא להמתין ולבדוק את נתוני ה-CGM שלך בתדריות גבוהה לפני נקיטת פעולה.

זמן נשיאה מוקדם

במהלך 24 השעות של שלב החימום, רמות סוכר אינן מוצגות. כמו כן, במהלך זמן הנשיאה המוקדם כאשר מייקם ההחדרה שלך מתרפא, רמות הסוכר שלך בחישון עלולות לא להיות תואמות אל רמות הסוכר שלך בدم קרוב כמו זהן תהינה לאחר שהרפואי סתיים. השתמש במד הסוכר בدم שלך להחלטות טיפול במהלך שלב החימום ועד אשר אתה בטוח ברמות ה-CGM שלך. זכור תמיד, אם הדרכך בה אתה מרגיש איננה תואמת אל רמות הסוכר ואת חץ המגמה שלך, השתמש במד הסוכר בדם שלך.

7

תקשורת Bluetooth

ה مصدر החכם מתקשר באופן אלחוטי עם המכשיר החדש שלך באמצעות Bluetooth על מנת להציג את רמות הסוכר שלך. אם התקשורת בין המصدر החכם שלך ובין המכשיר החדש שלך מתנתקת, אתה לא תוכל לראות רמות סוכר או חץ מגמה. השתמש במד הסוכר בדם שלך להחלטות טיפול אם המصدر החכם שלך אינו מתקשר עם המכשיר החדש שלך.

התראת רטט על גבי הגוף

ה مصدر החכם שלך מספק התראות רטט אם עברת מעבר לرمות התראות הסוכר אותן הגדרת. יחד עם זאת, אין להשתמש בהתראות רטט על גבי הגוף על מנת לבצע החלטות טיפול. כאשר אתה מקבל התראת רטט על גבי הגוף, בדוק את קריית הסוכר שלך ואת חץ המגמה על גבי אפליקציית Eversense NOW שלך.

Eversense NOW

אין לבצע החלטות טיפול מידי שהתקבל מה-CGM המוצג על גבי האפליקציה לניטור מרוחק Eversense NOW. הניטור מרוחק מסתמך על נתונים הנשלחים מן המכשיר החדש שלך דרך ענן Eversense ואך אף Eversense NOW. נתונים של חיבורים אלו ייעכו את הנתונים המוצגים ב-Eversense NOW. ניתן להשתמש רק במידע מה-CGM הנשלח ישירות מן המصدر החכם אל המכשיר החדש שלך לביצוע של החלטות טיפול.

שוחח עם הצוות הרפואי שלך

ארוחות

סוגים שונים של ארוחות עלולים להשפיע על רמות הסוכר שלך ועל חיצי המגמה, כמו גם תנאים כגון התroxיקנות מעיים מאוחרת. חלק מן המאכלים יעלו את הסוכר שלך מהר יותר אחרים. לפני השימוש במידע-hCGM שלך לביצוע של החלטות טיפול, שוחח עם איש צוות הבריאות שלך בנוגע לניהול של מנות אינסולין עבור סוגי שונים של אוכל אויך לבחב באופן מדויק את הפחמיות שלך.

7

אינסולין

אינסולין אינו משפייע מידית על הסוכר שלך. לדוגמה, בהתאם למוגג האינסולין המהיר בו משתמשים, התחלפת הפעולה שלו יכולה לקחת בין 5-15 דקות, כאשר השיא עלול להתרחש בין שעיה לשעתים לאחר הנטילה והכל לפרק זמן של 4-6 שעות. היה בטוח שאתה מבין את הדרך בה אתה מצפה מן האינסולין שלך להתחיל להוריד את הסוכר שלך, מתי מתרחשת הייעולות המקסימלית שלו וכמה זמן הוא נשאר בגוף שלך כאשר הוא ממשיך להוריד את הסוכר. עבדה עם איש הצוות הרפואי שלך על מנת להבין את ההתחלת, השיא ומשך פעולות האינסולין שלך תעזר לך למונע הצטברות אינסולין. הצטברות של אינסולין תקרה כאשר אתה נוטל מנת אינסולין בעוד המנה הקודמת עדין ממשיכה להוריד את הסוכר שלך. התוצאה עלולה להיות היפוגליקמיה חמורה. במקומות להגיב ולקחת אינסולין על בסיס ערך CGM גבוה, היה בטוח שאתה לווק בחשבון האם האינסולין מן המנה האחורה שננטלה עדין מורידה את הסוכר שלך באופן פעיל.

פעולות גופניות

אפילו פעילות גופנית קלה, אם היא איננה חלק מן השגרה שלך, עלולה לשנות את רמות הסוכר שלך בקצב מהיר יותר מאשר בדרך כלל. אם התסמנים שלך אינם מתאימים לערך-hCGM, או ערך-hCGM וחץ המגמה שלך אינם כפי שאתה מצפה מהם להיות, השתמש במידע הסוכר בدم שלך על מנת לבצע החלטות טיפול. חלק מהאנשים חוות התחלת של היפוגליקמיה שעות לאחר הפעולות הגופניות. אתה צריך לעקוב אחר המלצות הצוות הרפואי שלך למנת אינסולין לאחר פעילות גופנית כדי למנוע רמה סוכר נמוכה.

מחלה ולחץ

כאשר אתה חולה או לחוץ, ישנה השפעה על הסוכר שלך ויש לך תחת זאת בחשבון עבור ביצוע של החלטות טיפול. נכון שהלחץ אינו תמיד שלילי. אתה יכול למצוא שרמאות הסוכר שלך משתנות כאשר אתה מתחיל בחופשה או כאשר אתה הולך לאירוע חברתי מסוים. ה策ות הרפואי שלך יכול לעזור לך ליצור תוכנית עבור החלטות טיפול בזמןים בהם אתה חולה או מרגיש לחוץ.

תרופה

7

הבן אויר תרופות אותן אתה נוטל משפייעות על הסוכר שלך. חלק מתרופות הסוכר פועלות על מנת להוריד את הסוכר שלך וחלק מן התרופות, כגון סטרואידים, עלולות להעלות את רמות הסוכר שלך. עם ה-Eversense-E3, תרופות מסווג טריציקליין עלולות באופן כזב להוריד את רמות הסוכר שלך ואין עלייך להסתמך על קרייאות CGM כאשר אתה נוטל תרופות מסווג זה. שוחח עם איש צוות הבריאות שלך אודות תרופות אותן אתה נוטל ועל הדברים אותם יש לך תחת בחשבון בעת ביצוע של החלטות טיפול.

התרעות הסוכר של E3

ה策ות הרפואי שלך יעזר לך לקבע את טווח היעד ואת רמות התרעות הסוכר המתאיימות ביוטר עברוך.שים לב להתרעות סוכר מה- E3 – יכול להיות שהיא צריכה לצורך לבצע החלטת טיפול. כאשר אתה מקבל התרעעה על רמת סוכר שאיננה בטוחה, ערך הסוכר בחישון הוא מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל עם LO המוצג במקום המספר, או מעל ל-400 מ"ג/ד"ל עם HI המוצג במקום מספר. שאל את ה策ות הרפואי שלך אודות כיצד הטיפול ברמת סוכר נמוכה או מאוד גבוהה יכולה להיות שונה מדריך הטיפול הרגיליה שלך והשתמש תמיד במיד מד הסוכר בدم שלך על מנת לבצע החלטות טיפול כאשר מוצגות קרייאות סוכר נמוכות או גבוהות.

הבט אל העתיד




יש לך תחת בחשבון את השעה ביום כאשר מבצעים החלטת טיפול מבוססת CGM, בדומה לדרכך בה אתה עושה זאת כאשר אתה משתמש במיד סוכר בדם. לדוגמה, אם רמת הסוכר שלך גבוהה והיא עולה לפני השינה, התאים את מנת האינסולין שלך בהתאם להמלצות ה策ות הרפואי שלך. כמו כן, חשוב עלך דרך הטיפול אם אתה מתקנן פעילות גופנית או אם תשב בישיבה במהלך כל היום. יכול להיות שה策ות הרפואי שלך ימליץ לך להתאים את החלטות הטיפול שלך על בסיס מה שעומד לך רשות על מנת לנמנוע רמת סוכר גבוהה או נמוכה.

ביצוע של החלטות טיפול עם Eversense E3

עבור החלטת טיפול, עליך לקחת בחשבון:

- מידע אודוט שורת מצב.
- ערך סוכר הנוכחי בחיישן – ערך הסוכר הנוכחי אמרור להיות מוצג במצב שחור.
- חז מגמה – חז מגמה צריך להיות מוצג.
- מידע מגמה מעודכן והתרעות.


7

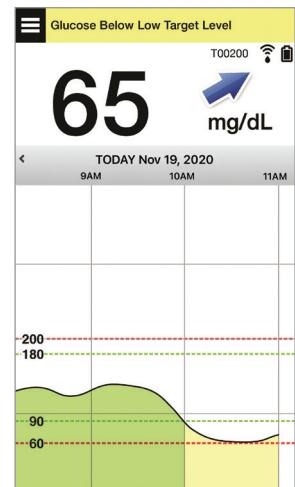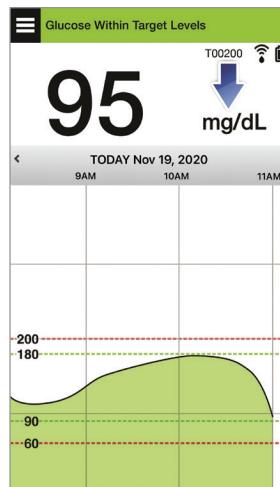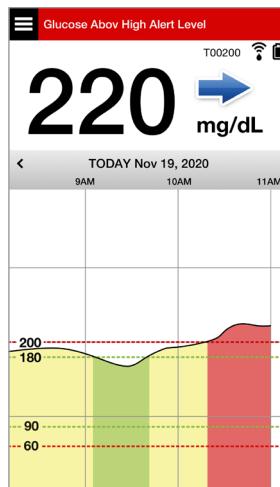

מתי אין לבצע החלטות טיפול:

- לא מוצג ערך סוכר.
- לא מוצג חז מגמה.
- התסמנים שלך לא מתאימים למידע הסוכר המוצג.
- ערך הסוכר בחישון הנוכחי מוצג במצב אפור.
- שורת המציג מוצגת במצב כתום.
- אתה נוטל תרופות מסווג טריציקלן.

7

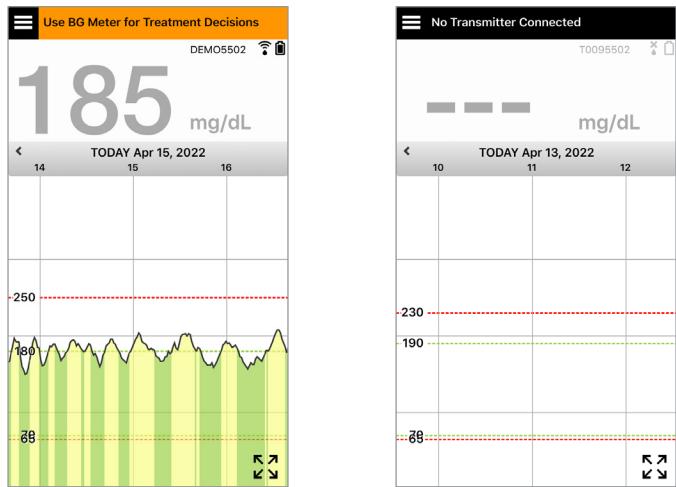

הערה: התwich תמיד אל מידע הסוכר על גבי אפליקציית CGM-Eversense שלך על גבי הטלפון החכם שלך עברו ביצוע של החלטות טיפול. אין להשתמש בתצוגה משנית כגון Apple Watch או Eversense NOW.

חיצי מגמה של E3 והחלטות טיפול

חיצי המגמה של E3 מראים את הכוון ואת שיעור השינוי של רמות הסוכר שלאן מנת לתת לך מידע לגבי רמות הסוכר שלך מתקדמות. שוחח עם הוצאות הרפואית שלך אודוט השימוש בחיצי מגמה אשר יסייע לך ללביצוע של החלטות טיפול. בדרך כלל, אם החץ פונה כלפי מטה, יכול להיות שתיקח בחשבון ליטול פחות אינסולין, ואם החץ פונה כלפי מעלה, אולי טיפול יותר. היה זהיר לא ליטול יותר מדי אינסולין בזמן קצר, דבר שיוביל לרמות סוכר נמוכות בעקבות ערמה של אינסולין. חיצי-E3 מתוארים למטה, ביחס עם הדרכים שיש להשתמש בהם עבור החלטות טיפול. שוחח עם איש צוות הבריאות שלך אודוטה ביצוע של התאמות לטיפולים המבוססים על חיצי מגמה. **עלעולם אין לבצע החלטות טיפול על ידי שימוש ב-CGM כאשר לא מזג כל חץ.**

7

ח' מגמה	Eversense E3	מה הוא מצין	סוכר נמוך	סוכר גובה	סוכר בטוח
לא ח' מגמה	אין מספיק נתונים בצדדים להסביר את כיוון מגמת הסוכר או את שיעור השינוי.	בצע בדיקת סוכר בدم מהאצבע באמצעות מד הסוכר בדם שלך לפני כל החלטת טיפול, אפילו אם רמות הסוכר שלך נמצאות בטוחות.			
	הסוכר יורדת בקצב מהיר (< 2.0 מ"ג/ד"ל/דקה).	טפל באמצעות CGM את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדר לפני הבוצע של החלטת טיפול.	טפל באמצעות CGM את ערך ה-CGM ואת חץ המגמה באופן תדר לפני הבוצע של ההחלטה.	טפל באמצעות CGM את ערך ה-CGM ואת חץ המגמה באופן תדר לפני הבוצע של ההחלטה.	טפל באמצעות CGM את ערך ה-CGM ואת חץ המגמה באופן תדר לפני הבוצע של ההחלטה.

סוכר בטוח	סוכר גבoga	סוכר נמוך	מה הוא מצין	Eversense E3 חץ מגמה
אם נטلت לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, המtan ובודק את ערך ה-CGM שולר ואת חץ המגמה באופן תדר לפני ביצוע של החלטת טיפול.	אם נטلت לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, קח בחשבון התאמה של מנת האינסולין כלפי מעלה.	אם נטلت לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, המtan ובודק את ערך ה-CGM שולר ואת חץ המגמה באופן תדר. אם לא נטلت לאחרונה אינסולין או אם סימנת פעילות גופנית, קח בחשבון התאמה של מנת האינסולין כלפי מעלה.	הSOCR שלר עולה בין 15 מ"ג/ד"ל ל-30 מ"ג/ד"ל או יותר בתוקן 15 דקות.	הSOCR שלר בקצב מהיר (< 2.0 מ"ג/ד"ל/דקה).
אם לא טיפול, אך אם נטلت לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, בדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדר.	אם נטلت לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, המtan ובודק את ערך ה-CGM שולר ואת חץ המגמה באופן תדר. אם לא נטلت לאחרונה אינסולין, קח בחשבון התאמה של מנת האינסולין כלפי מעלה.	קח בחשבון טיפול באמצעות מחמיות. אם נטلت לאחרונה אינסולין בדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדר.	הSOCR שלר עולה או יורדת עד 15 מ"ג/ד"ל בתוקן 15 דקות.	הSOCR משתנה בהתאם (1.0 מ"ג/ד"ל/דקה או פחות).

מה תעשה


חלק זה מספק דוגמאות למצבים בהם אתה עלול להיתקל. חשוב מאוד לזכור בחשבון את הדברים שקרו ואת הדברים שעומדים לךrosis בעת ביצוע של החלטות טיפול עם CGM. סקור את הדוגמאות הללו בהירות וחשב על הדברים אותם אתה צריך לזכור ל乾坤 בחישוב ביצוע של החלטות טיפול. אם אין בטוח, תמיד בדוק את רמת הסוכר שלך בدم מהאצבע לפני ביצוע של החלטות טיפול.

רמת הסוכר מתחת ליעד ברמה של 65, אך הרמה עולה במתינות. רמת הסוכר שלך יכולה להגיע ל-120. בתוך 30 דקות.

7


השעה היא 9 בבוקר והזרקת mana של אינסולין עברו ארוחת הבוקר שלך בערך לפני שעתיים.

- האם עלייך להמתין ולשים לב לרמת הסוכר שלך ולחץ לפני ביצוע של החלטות טיפול?
- האם עלייך לנקוט בחישוב נטילת פחמיות כדי לטפל ברמה הנמוכה כעת?

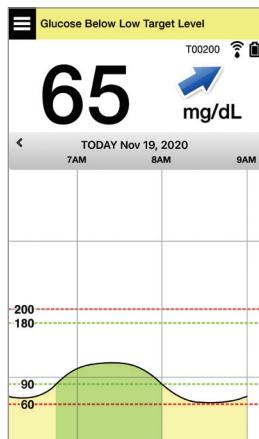

השעה היא 7 בבוקר ואתה עומד לאכול ארוחת בוקר, ושתיית כוס קטנה של מיץ תפוזים כאשר התעוררת.

- האם עלייך לשקלול ל乾坤 קצת פוחות אינסולין מאשר אתה נוטל בדרך כלל עם הארוחה שלך?
- האם עלייך ליטול את כמות האינסולין הרגילה אותה אתה נוטל בארוחת הבוקר ולשים לב לרמת הסוכר שלך, לחץ ולדריך בה אתה מרגיש?

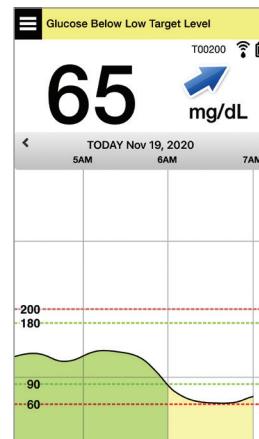


רמת הסוכר ביעד ברמה של 90, אך הרמה עולה במהירות. רמת הסוכר שלך יכולה להגיע ל-180 או יותר בתוך 45 דקות.

- השעה היא 2acha"צ ונטלת מנת אינסולין אשר תכסה את ארכות האצרים שלך ועוד טיפה נוספת בגין החץ אשר עלה ב מהירות, עבר לפני 90 דקות.
- בגין שעברו רק 90 דקות ממנה האינסולין, האם עלי' להמתין ולשים לב לרמת הסוכר ולהזגמה שלך?
- מהו זמן ההמתנה עלי' המליך ה策ות הרפואית שלך בין מנת אינסולין בכדי למנוע ה策בותות של אינסולין?



- **עכשין צהרים, אתה עומד לאכול ארוחת צהרים.**
- מה יכול לגרום לעלייה רמת הסוכר?
- האם עליך לשקלול לקחת יותר אינסולין מאשר אתה נוטל בדרך כלל עם הארוחה שלך?
- על איזו התאמת של מנת האינסולין המליך ה策ות הרפואית שלך עברו מצבים אלו?

7

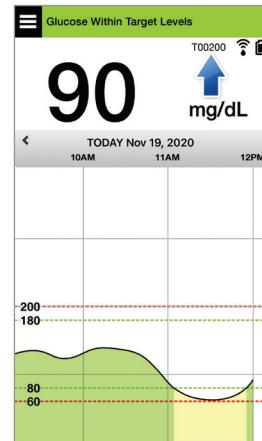


רמת הסוכר ביעד ברמה של 95, אך הרמה יורדת במהירות. רמת הסוכר שלך יכולה להגיע ל-65 או פחות בתוך 15 דקות.

7


סימת כרגע את הפעולות הגוףנית שלך.

- מהי הדרך עלייה המלאץ הצעות הרופאי שלך בכדי למנוע רמת סוכר נמוכה לאחר פעילות גופנית?
- שקוול חטיף בכדי למנוע אירוע סוכר נמוך.
- שים לב לרמת הסוכר שלך, לחץ המגמה ולדרך בה אתה מרגיש.

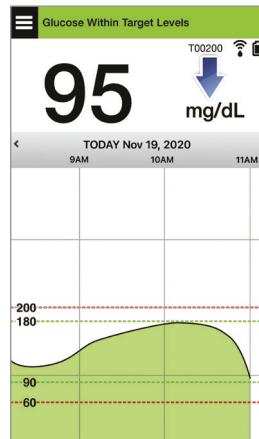

אתה עומד להתחיל בפעולות גופנית.


- מה יכול לגרום לירידה מהירה של רמת הסוכר?
- שקוול לקחת חטיף בכדי למנוע אירוע סוכר נמוך.
- שקוול את האפשרות לדוחות את הפעולות הגוףנית שלך עד אשר חץ המגמה ורמת הסוכר שלך יותר יציבים. שים לב לרמת הסוכר שלך, לחץ המגמה ולדרך בה אתה מרגיש.

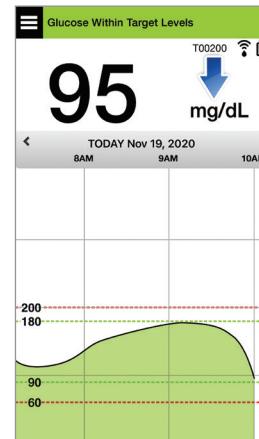

רמת הסוכר מעל רמת התרעה גבוהה של 220 והרמה משתנה בהדרגה. הסוכר שלך עשוי לרדת ל-190 או לעלות ל-250 בתוך 30 דקות.

השעה היא 10 בערב, אתה עומד לлечת לישון.
עברו שעתים וחצי מאז מנת האינסולין
האחרונה שלך.


- מה יכול לגרום לרמת סוכר גבוהה זו?
- כמה לווקח בדרך כלל לאינסולין בו אתה משתמש לשיטים וולוריד את רמת הסוכר שלך?
- איזו רמת סוכר לפני השינה מומלצת על ידי ה策ות הרפואית שלך?
- איך אתה בדרך כלל מטפל בرمות סוכר גבוהות לפני השינה?

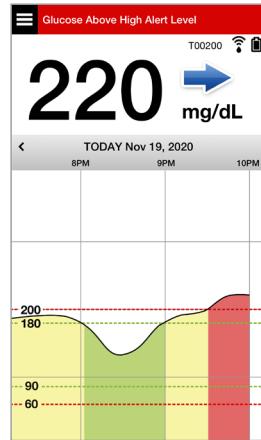

השעה היא 7 בערב, אתה עומד לאכול ארוחת ערב. עברו 6 שעות מメント האינסולין שלך בצהרים.

- מה יכול לגרום לרמה כל כך גבוהה של סוכר לאחר הארוחה האחרונות שלך?
- האם יש לך יום לחוץ; האם אתה מרגיש טוב?
- האם עלייך לקחת בחשבון יותר אינסולין או אכילה של פחות פחמימות מאשר אתה נוטל או אוכל בדרך כלל עם ארוחה זו?

7

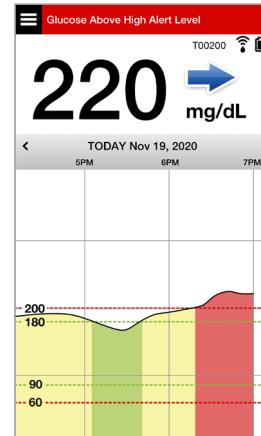

זכור, אם אין בטוח, בצע תמייד בדיקת סוכר מהאצבע באמצעות מד הסוכר בדם שלך לפני ביצוע של החלטת טיפול.

גרף מגמה


נעsha שימוש בגרף המגמה על מנת לראות ולהבחן נתונים ומוגמות היסטוריים של רמות סוכר לאורך זמן. הוא גם מציג סימנים עבור אירועים אחרים והזנת באופן ידני אל תוך האפליקציה (לדוגמא, בדיקות כויל או פעילות גופנית).

ניתן להשתמש בגרף מגמה בכמה דרכים:

- סקירה מהירה של מצבם הנוכחי של רמות הסוכר ורמת ההתרעה שהגדרת. הקווים המקבוקווים האדומים מציגים את רמות ההתרעות לדוחות סוכר גבוהות או נמוכות, והקוים המקבוקווים הירוקים מציגים את רמות העיד לרמות סוכר גבוהות או נמוכות (טוווח העיד שלך).

7

- אזהרים מוצללים בגרף מקודדי צבעים בהתאם להגדרות רמות הסוכר אותן הזנתה:

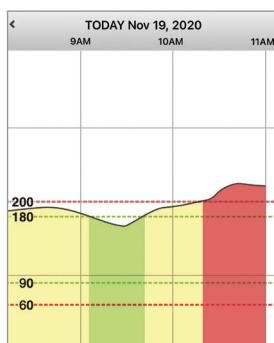

- ערכי רמות סוכר הנמצאים **מחוץ** לרמת ההתרעה **לרמת הסוכר שלך** יהיו אדומים.
 - ערכי רמות סוכר הנמצאים **בתוך** רמת **היעד** **לרמת הסוכר שלך** יהיו יוקים.
 - ערכי רמות סוכר הנמצאים **בין** **ערכי** **רמת ההתרעה** **ורמות היעד עבור רמות הסוכר שלך** יהיו צהובים.
 - לחץ והחזק כל נקודה על גבי קו הגרף על מנת לראות קריית סוכר ספציפית לנקודת זמן מסוימת.
 - לחץ על כל סימן על גבי מסך האפליקציה על מנת לקבל מידע נוסף בנוגע לאירוע או להתרעה.
 - בצע תנועת צביטה פנימית והחוצה על המסך כדי להציג טווחי תאריך/שעה אחרים על גרף המגמה. תוכל להגדיל ולהקטין את התצוגה כדי לראות מידע של 3 שעות עד 3 ימים.
 - על מנת לראות את נתוני גרף המגמה עבור תאריך שונה, לחץ על שדה התאריך על המסך והזן את התאריך הרצוי.
 - אתה יכול לראות את גרפם המגמה הן בכיוון אונci והן בכיוון אופק. בכיוון אופק, ישנו לחצני קצר על מנת לראות את מבטי 7, 14, 30 או 90 ימים.
- הערה:** כל נתוני הסוכר שלך יאוחסנו באפליקציה כל עוד יש לך זיכרון זמין במכשיר הנייד שלך.

אפשרויות תפריט

סמל התפריט (≡) מופיע בפינה השמאלית העליונה של כל מסכי האפליקציה ומספק גישה קלה למאפיינים האפליקציה האחרים. תפריט התפריט הבאים זמינים:

תיאור	אפשרויות תפריט
מסך האפליקציה הראשי שמציג את קריית ה-CGM הנוכחית, את כיוון וקצב השינוי, גרפ המגמה, אירועים והתרעות.	My Glucose (הסוכר שלי) 
הזמן ערכי סוכר של סוכר בדם.	Calibrate (כימל) 
סוקר את ההתרעות וההודעות בעבר. ראה טיואר התרעות למידע נוסף.	Alert History (היסטוריית התרעות) 
הזמן מידע ברגען לפעולות כגון ערכי סוכר בדם, ארכות, אינסולין, בריאות ופעולות גופנית. ראה יום אירועים למידע נוסף.	Event Log (יום אירועים) 
סקור דוחות שונים הנוגעים לנוטוני CGM שלך. ראה דוחות למידע נוסף.	Reports (דוחות) 
אפשר לאחרים לראות את נתוני קריאות הסוכר שלך דרך האפליקציה למיכשר נייד NOW Eversense.	Share My Data (שתף את הנתונים שלי) 
בדוק את התקשרות בין המשדר החכם והחישון. השתמש במסך זה בכל פעם אתה מצמיד את המשדר החכם על מנת לוודא שהתקבעה תקשורת.	Placement Guide (מדריך מיקום) 
בצע או בדוק את החיבור בין המשדר החכם ומיכשר הנייד. דרך חיבור Bluetooth על מנת לשלוח נתונים אל האפליקציה.	Connect (חבר) 
התאם באופן אישי הגדרות כגון רמות יעד עבור רמות הסוכר, רמות התרעה, צליים ופרופיל זמני. ראה הגדרות של הגדרות שלך למידע נוסף.	Settings (הגדרות) 
ראה מידע אודוט מערכת CGM שלך, כולל מספרי זיהוי עבור החישון והמשדר החכם. שנה או מחק את תמונה הפרופיל שלך וצא מן המערכת.	About (אודות) 

7

8. התאמת אישית של ההגדרות שלך

חלק זה מתאר כיצד להתאים אישית את ההגדרות במערכת CGM Eversense E3 שלך.

תחומים בהם תוכל להתאים אישית את ההגדרות האפליקציה כוללים:

- **Glucose** (סוכר) – רמות סוכר וערכי שינוי אשר יגרמו להתרעה.
- **Calibration Reminders** – (תזכורות ציול) – ניתן באופן אופציוני לקבע זמן תזכורת לכיוול.
- **System** (מערכת) – מזהה או מאפשר לך להציג מידע מותאם אישית לגבי המערכת שלך.
- **Sound Settings** (הגדרות צילם) – משנה את הצללים עבור חלק מהתרעות הסוכר, הגדר זמן נודניק ונא לא להפריע.
- **Temp Profile** (פרופיל זמן) – קבע פרופיל זמן עבור קריאות הסוכר.

8

רמת סוכר


מערכת CGM E3 CGM מיועדת לספק התרעות על המשדר החכם והמכשור הנידי שלך כאשר רמות הסוכר מגיעות לרמות ההתרעה שהגדרת. תוכל להחליט על ההגדרות עבור התרעות הסוכר, היעדים וקצב השינוי בהתאם על נתונים מהוצאות הרפואית שלך.

ازהרה: התרעות על רמות נמוכות וגובהות של סוכר מיועדות לשיער לך בניהול הסוכרת ואין להשתמש אך ורק בהן לדיהוי היפוגליקמיה או היפרגליקמיה. יש להשתמש תמיד בהתרעות ביחד עם מדדים אחרים של מצב הסוכר שלך כגון רמת הסוכר, מגמות, גרפים ועוד.

חשוב:

- התרעות עברו רמות סוכר נמוכות או גבוהות שונות מراتם העד של רמות הסוכר שלך.
 - ההתרעות על רמות נמוכות וגובהות של סוכר מודיעות לך באמצעות המCHIP הנייד והמשדר החכם כאשר הגעת אל ערך נמוך או גבוהה מסוים.
 - יעדיו הסוכר נמצאים בשימוש בבדיקות ובגרפי קו כדי להציג לך את ביצועי רמות הסוכר בהשווואה ליעדים שהגדרת. לא תופעל התרעה כאשר תגיע לרמות העד של הסוכר שקבעת. לא תופעל התרעה כאשר תגיע לרמות העד של הסוכר שקבעת.
 - התרעות על רמות חיזוי של סוכר נמוכות או גבוהות תודיענה לך על גבי המCHIP הנייד שלך ועל גבי המשדר החכם שלך כאשר אתה עלול להגיע לרמות העד של הסוכר שקבעת.

8

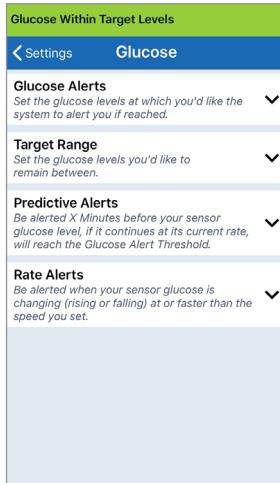

במסך **Glucose Settings** (הגדרות סוכר), הקש על "סימן ה الكرט" ▼ על מנת להרחיב ולצמצם את אפשרויות ההגדרות.

הגדרה של רמות התרעות עבור רמות סוכר

מערכת CGM Eversense E3 תשליך לך התרעות כאשר רמות הסוכר שלך נמצאות מחוץ להגדרות התרעות אותן קבעת. אם הגעת לرمות התרעות הנמוכות או הגבוהות עבור רמות הסוכר שלך, המשדר החכם רוטט והאפליקציה מספקת התרעות ציל וכמו כן מציגה מסר על גבי המסך.

8



גובהה: 250 מ"ג/ד"ל נמוכה: 65 מ"ג/ד"ל	Default setting (הגדרת ברירת מחדל)
אתה יכול לשנות את רמות התרעות בהתאם למזה שאתה והוצאות הרפואי שלך מסכימים שהן הרמות הנכונות עבורך. לא ניתן לקבוע רמת התרעות לרמת סוכר נמוכה אשר תהיה גבוהה יותר מרמת היעד הנמוכה שלך, ורמת התרעות שלך עבור רמת הסוכר הגבוהה שלך לא יכולה מתחת לרמת היעד הגבוהה שלך.	
גובהה: 350 מ"ג/ד"ל - 125 מ"ג/ד"ל נמוכה: 60 - 115 מ"ג/ד"ל	Allowable setting (הגדרה המותרת)
הגדרת התרעות סוכר נמוך תמיד מופעלת. את הגדרת התרעות סוכר גבוהה ניתן להפעיל או לכבות. התרעות סוכר גבוהה לא תציגנה או תרטוטנה על גבי המשדר החכם אם מאפיין זה כבוי.	On/Off setting (הפעלה/כיבוי של הגדרה)
התרעות ציל והתרעות חזותיות על גבי המכשיר הנייד שלך והתרעות רטט על הגוף של המשדר החכם.	הערות

חשוב:

- רמות התרעות לסוכר נמוך וגובהה אותן תקבע הן אותן הרמות המשמשות לספק התרעות חייז'. עיין בחלק, הגדרת התרעות חייז'.
- עבור iOS או מעל, ו-אנדרואיד 6 ומעלה, אתה יכול לאפשר להתרעות סוכר נמוך ולהתרעות סוכר נמוך שלא נמצאות בטוחה של אפליקציית Eversense לעקוף את הגדרות הציל של הטלפון שלך. ראה הגדרות ציל למידע נוסף.


2. תחת Glucose Alert Levels (רמת התראעה על סוכר), לחץ על High Alert (רמת התראעה על סוכר גבוהה) ובחר את רמת ההתרעות המתאימה עבור רמת הסוכר הגבוהה.

- לחץ על Done (סיום) לאחר ההשלמה.
- חזור על השלב לבחירת Low Alert (התראעה על סוכר נמוך).

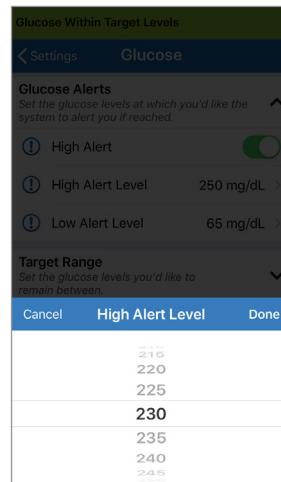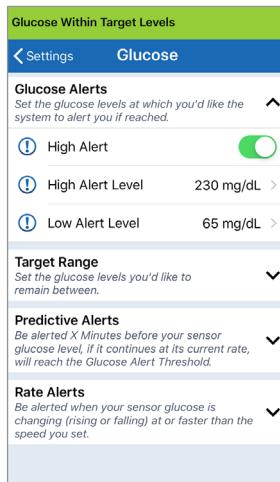

1. בלחוץ על Glucose (תפריט < הגדרות < סוכר) על מנת להציג את מסך GLUCOSE SETTINGS (הגדרות סוכר).

8


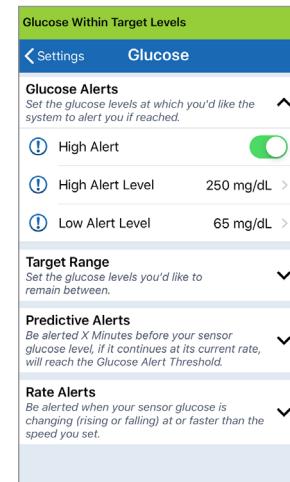


הגדרה של רמות יעד עבור רמות סוכר


רמות היעד עבור רמות הסוכר הן הרמה הנמוכה והרמה הגבוהה של הטווח אותן הצבת לעצמך במהלך היום. נעשה שימוש בהגדרות אלו באפליקציה על מנת להראות מתי רמות הסוכר שלך נמצאות בתחום טווח היעד שלך.

8	נמוכה: 70 מ"ג/ד"ל גובהה: 180 מ"ג/ד"ל אתה יכול לשנות יעדים אלו בהתאם למה שאתה והצוות הרפואי שלך מסכימים שהן הרמות הנכונות עבורך.	Default setting (הגדרת ברירת מחדל)
	נמוכה: 65 - 120 מ"ג/ד"ל גובהה: 120 - 345 מ"ג/ד"ל	Allowable setting (ההגדרה המותרת)
	תמיד פועל (לא ניתן לקבות) בשימוש בגרפים ותרשימים באפליקציה על מנת להראות את הזמן בו הייתה boveach היעד.	On/Off setting (הפעלה/כיבוי של הגדרה)

- 2. נחתת Glucose Target Levels (רמת היעד של הסוכר), לחץ על High Target (יעד גבוה) ובחר את רמת יעדי הסוכר הגבוהה המתאימה.**
- לחץ על Done (סיום) לאחר ההשלמה.
 - חזור על השלב לבחירת Low Target (יעד נמוך).

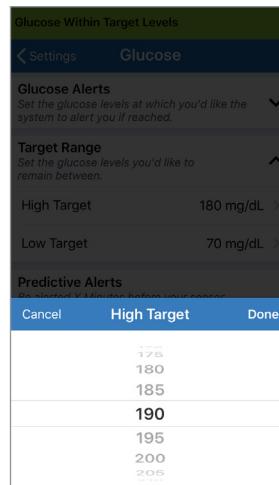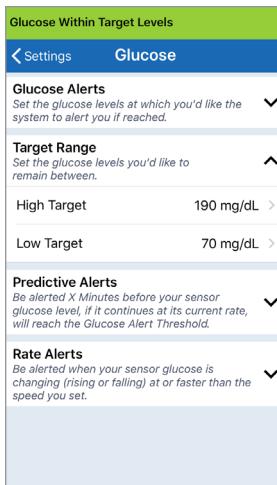

1. 1. לחץ על Glucose (תפירת>הגדרות>סוכר) על מנת להציג את מסך GLUCOSE (הגדרות סוכר).

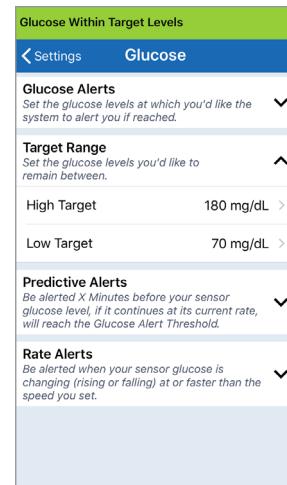

8

הגדרת התרעות חיזוי

התרעות החיזוי מודיעות לך מראש שישנו אירוע של רמות סוכר נמוכות או גבוהות אשר עלול להתרכש אם המגמה הנוכחית ממשיכה.

התרעות החיזוי משתמשות בرمות התרעעה עבור רמות גבוחות או נמוכות של סוכר אשר נקבעות קודם לכן על מנת לספק אזהרה "مוקדמת". אתה קובע את זמן האזהרה המוקדמת (10, 20, או 30 דקות) על מנת שתקבל התרעעה מראש על הגעה אל רמות התרעעה שלך, על בסיס מגמות הסוכר הנוכחית שלך. כאשר הגיעו לך זמן האזהרה המוקדמת, המשדר החכם ירטוט והאפליקציה בטלפון הנייד תספק התרעעת צליל וכמו כן תציג מסר על גבי המסך.




8

כובי	Default setting (הגדרת ברירת מחדל)	Allowable setting (הגדרה המותרת)	הערות
10, 20, או 30 דקות לפני			
אתה יכול להפעיל או לכבות התרעות אלו. התרעות חיזוי יוצגו רק אם תקונה זו מופעלת. ברירת המחדל היא 20 דקות.		On/Off setting (הפעלה/כיבוי של הגדרה)	
התרעות צليل והתרעות חזותיות על גבי המכשיר הנייד שלך והתרעות רטט על הגוף של המשדר החכם.			

1. כדי להפעיל תכונה זו, לחץ על Menu > Settings > Glucose (תפריט > הגדרות > סוכר) להציג GLUCOSE SETTINGS מסך (הגדרות סוכר).

2. ליד High and Low Predictive Alerts (התראות חיזוי גבוקות ונמוכות), הילק את לחץ OFF (כבי) אל ON (פועל).

3. לחץ על Minutes (דקות) על מנת לבחור את כמות הדקות עבור התראה המוקדמת • לחץ על Done (סיום) לאחר ההשלמה.

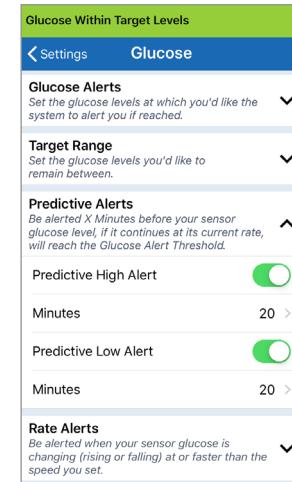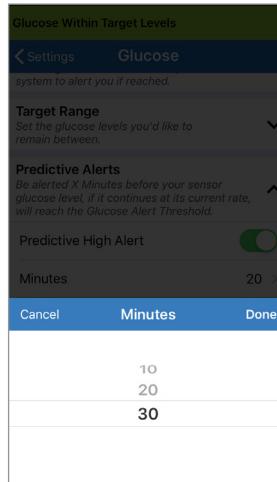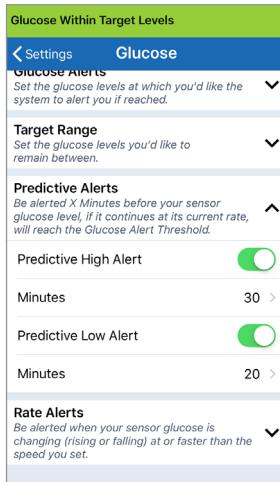

8

הגדרה של התראות עברו קצב שינוי

התראות ערכי השינוי מודיעות לך כאשר רמות הסוכר שלך נופלות או עולה מהר יותר מהגדרת התראת הערך אותה תבחר.

כבי	Default setting (הגדרה ברירת מחדל)	Allowable setting (הגדרה המותרת)	On/Off setting (הפעלה/כיבוי של הגדרה)	הערות
1.5 - 5 מ"ג/ד"ל לדקה				
אתה יכול להפעיל או לכבות התראות אלו. לא תתרחשנה התראות קצב שינוי עד אשר מאפיין יופעל.				
התראות צליל והתרעות חזותיות על גבי המכשיר הנייד שלך והתרעות רטט של המשדר.				

8

1. כדי להפעיל תכונה זו, לחץ על




Menu > Settings > Glucose

תפריט > הגדרות > סוכר (הציג

GLUCOSE SETTINGS

מsec (הגדרות סוכר).

8

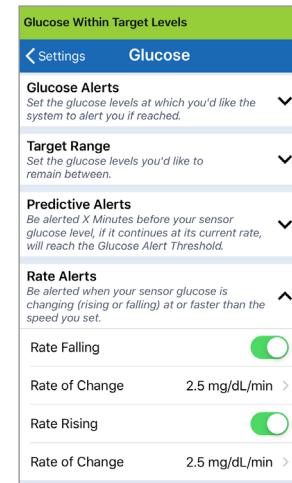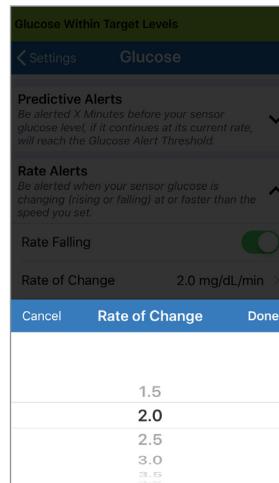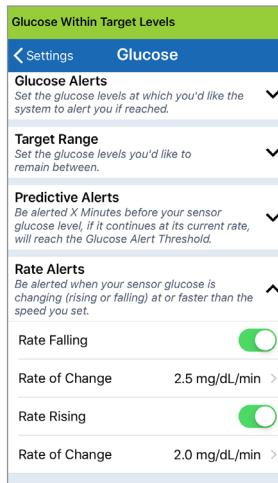

הגדרה של תזכורות ציול יומיות

באופן אופציוני אתה יכול להגדיר תזכורות ציול יומיות בזמנים הנוחים עבורך. אתה עדין תקבל התרעות והודעות ציול המיצירות על ידי המערכת.

cabin cabin cabin	Default setting (הגדרת ברירת מחדל)	Allowable setting (הגדרה המותרת)	On/Off setting (הפעלה/כיבוי של הגדרה)	הערות
שעה ביום במרוחקים של דקה אחת				
אתה יכול להפעיל או לכבות מאפיין זה. לא תציגנה התרעות חיזוי אלא אם כן תcona זו מופעלת.				
אתה יכול להגדיר תזכורת אחת או שתי תזכורות יומיות. רק הודעות שמע והתרעות חוזתיות על גבי מסך הטלפון שלך – ללא רטיטים מן המשדר. אם אתה מזוקק את האפליקציה לנידך ולאחר מכן מתקין אותה מחדש, יש לאפס תזכורות אלו. תזכורות אלו לא תישמרנה בהיסטוריה ההתרעות. אם אתה לחבר חדש חדש אל אפליקציה קיימת, הגדרות אלו תישארנה ללא שינוי. עיין בחלק 'נא לא להפריע' באפליקציה Eversense ומכשירים נידדים למיידע נוספת.				

הגדרת מידע אודות המערכת

.Eversense E3 CGM (מערכת) מאפשר לך להציג ולערוך הגדרות אחרות במערכת

Glucose Within Target Levels	
Settings	System
Glucose Units	mg/dL
Name	T0095502 >
Linked Sensor	221984 >

1. לחץ על **תפריט > System > Settings** (תפריט > הגדרות > מערכת) להציג מסך **SYSTEMS** (מערכת).


2. במסך **SYSTEMS** (מערכת), אתה יכול ללחוץ על הדברים הבאים על מנת להציג אוותם:

- **Glucose Units** (יחידות סוכר). יחידת המידה עבור קרייטות הסוכר שלך. יש להתקין מחדש את האפליקציה על מנת לעורר הגדרה זו.
- שם. המספר הסידורי של משדר החכם שלך. אתה יכול גם ללחוץ על המספר הסידורי המוצג כאן ולתת לשדר החכם שלך שם מותאם אישית.
- **Linked Sensor** (חישון מוקשור). המספר הסידורי של החישון המקשר רגעים לשדר החכם. לחץ על מאפיין זה על מנת לקבל גישה אל היכולת לחבר או לפרק מחדש חישון מסוים.


קישור מחדש של חיישן

חשיבות: אין לחבר מחדש את החישן אלא אם כן מחלוקת שירות לקוות ייעשה לר' לעשות זאת. קישור מחדש של החישן יזרור את המערכת לשלב האתחול, דבר אשר ידרש 4 כוילם באמצעות בדיקת סוכר בכל מ' האצבע במהלך 36 שעות.


4. לחץ על Cancel (בטל) או OK על מנת המשיך.

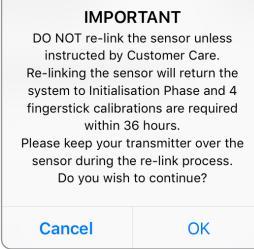

5. לחץ על Cancel (בטל) או Re-link (קשר מחדש).

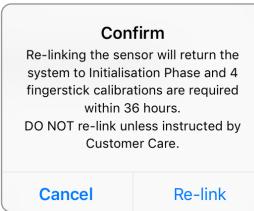

3. לחץ על sensor (קשר מחדש חיישן מאוטר).

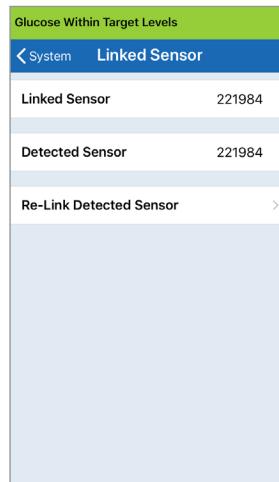


1. אשר עם מחלוקת שירות לקוות שעליך לבצע קישור מחדש של החישן שלך.

2. לחץ על Linked Sensor (חישן מקשר).



6. תהליך הקישור יתחיל. בסיום של כל שלב יוצג סימן ביקורת. התהיליך עשוי להימשך עד 10 דקות עד להשלמתו. אל תזיז את המshedר החכם ממקומו החישוני שלך עד אשר סימן האישור השלישי יוצג.

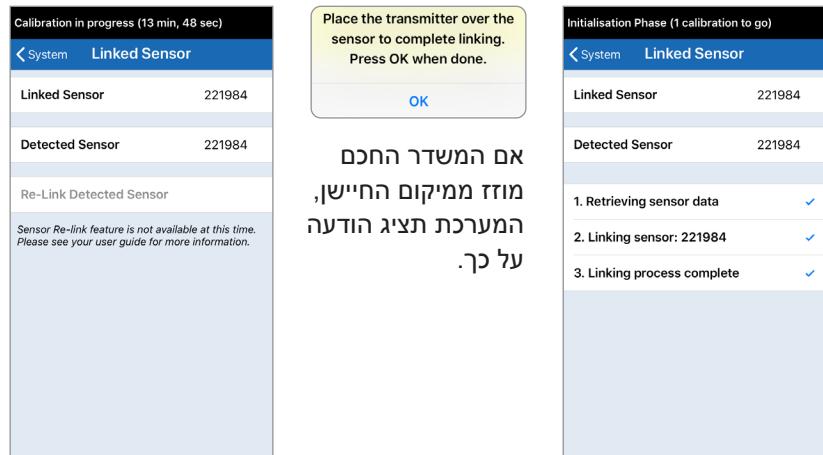

הערה: לחץ הקישור מחדש לא יהיה זמין תחת התנאים הבאים:

- יש להטען מחדש את סוללת המshedר שלך או שהיא ריקה לגמר.
- כאשר מתבצע כיוול.
- לפני שקשור חישון כלשהו.
- התרעות מסוימות של החלפת חישון.
- אם אחת מן התרעות למטה פעליה:
 - סיום חי המshedר
 - שגיאת זמן מערכת
 - השעיה חישון


הגדרת צלילים

מסך **SOUND SETTINGS** (הגדרות צליל) מציג את הגדרות צלילי התרעה עבור רמות סוכר גבוהות ונמוכות. מסך זה מאפשר לך להציג הגדרת נמנום עבור התרעה המופיעות בראשימה, ומונע לך את האופציה שהתרעות סוכר הנמנום והתרעות הסוכר הנמוכות מחוץ לטוויה תעבורנה מעל להגדרות הצליל של הטלפון שלך (iOS 12 ומעלה, ואנדרואיד 6 ומעלה).

הגדרת התרעת הנדניין
אפשרה להציג באיזו תדירות
התרעה תזכיר על עצמה לאחר
שתקבל התרעה על סוכר נמוך
או גבוה.



- 3. לחץ על כל התרעת
נדניין על מנת להציג
את התדריות בה התרעה
חווארת על עצמה.
• לחץ על Done (סיום)
לאחר ההשלמה.**

8

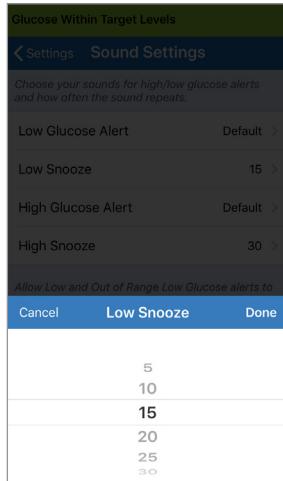

- 2. לחץ על כל התרעה על מנת
לבחור את הצליל שלה.
לחץ על Back (הקודם) על
 מנת לחזור למסך **SOUND
SETTINGS** (הגדרות צליל).**

- 1. לחץ על **Settings** > **Sound Settings**
> הגדרות > הגדרות צליל
על מנת להציג את מסך
SOUND SETTINGS
(הגדרות צליל).**

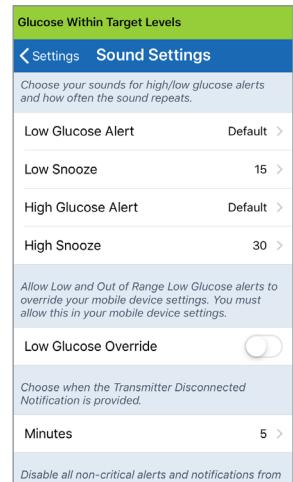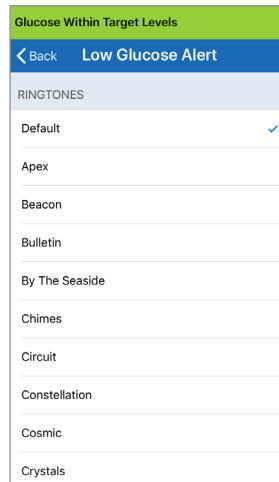


חשוב: ודא שהצליל במכשיר הנייד שלך מופעל. אם תכבה את הצליל במכשיר הנייד, לא תשמע צלילים כלשהם מהאפקטיה.

הגדרת מעקב לsoccer נמוּן


אם המכשיר הנייד שלך הוא עם מערכת הפעלה של iOS 12 או יותר, ואנדרואיד 6 ומעלה, אתה יכול באופן אופציוני לאפשר להתרעות הסוכר הנמוכות ולהתרעות הסוכר גבוהה בטלפון שלך נמצאות בטווין לעקוּף את הגדרות הצליל של הטלפון שלך. כאשר מופיעין זה מופעל, התרעות הסוכר הנמוכות והתרעות הסוכר הגבוהות שלא נמצאות בטווין תישמענה בעוצמת קול הגבוהה ביותר של הטלפון שלך. אתה לא יכול לשנות את עצמת הקול עבורה הגדרה זו. דבר זה מאפשר לך לקבל התרעות_soccer נמוכות והתרעות_soccer גבוהה שלא נמצאות בטווין הטלפון שלך נמצאת במצב שקט או במצב 'נא לא להפריע'. עליך לאפשר זאת בהגדרות המכשיר הנייד שלך.

מכשיר iOS


3. לחץ על Allow (אפשר).

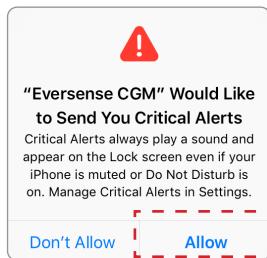

2. לחץ על Settings (הגדרות).

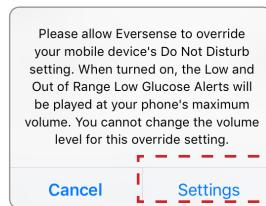


1. לחץ על הלחצן על מנת להפעיל את ההערכה.

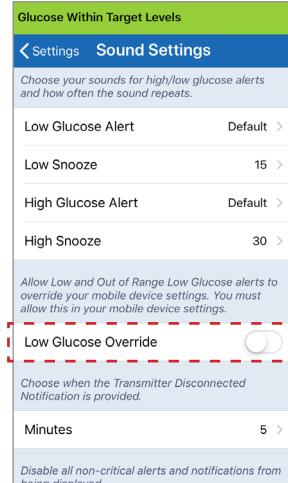

4. CUT ניתן להפעיל את ההגדרה מעקב סוכר נמוך


המערכת CUT תאפשר לך לקבל התרעות סוכר נמוכות והתרעות סוכר נמוכות שלא נמצאות בטווין בטלפון שלך בעוצמת צליל מקסימלית, גם כאשר הטלפון שלך נמצא במצב שקט/רטט או במצב 'נא לא להפריע'.

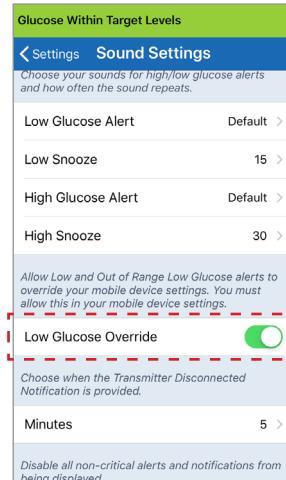

8

הערה: מאפיין זה דומה למאפיין שעון מעורר אשר יישמע תמיד ללא קשר להגדרות הצליל של הטלפון שלך.

הערה: אם תלחץ על **Don't Allow** (אל תאפשר) בשלב 3, לא תוכל לבצע את המעקף של סוכר נמוך. על מנת להפעיל הגדרה זו בכל זמן אחר, כאשר אתה לוחץ על **Settings** (הגדרות) משלב 2, הגדירות ה-Eversense **Allow Critical Alerts** (התראות) **Notifications** (התראות) מושפעות על **Allow Critical Alerts** (התראות קריטיות). ולאחר מכן תוכל להפעיל את המעקף של סוכר נמוך באפליקציית Eversense.

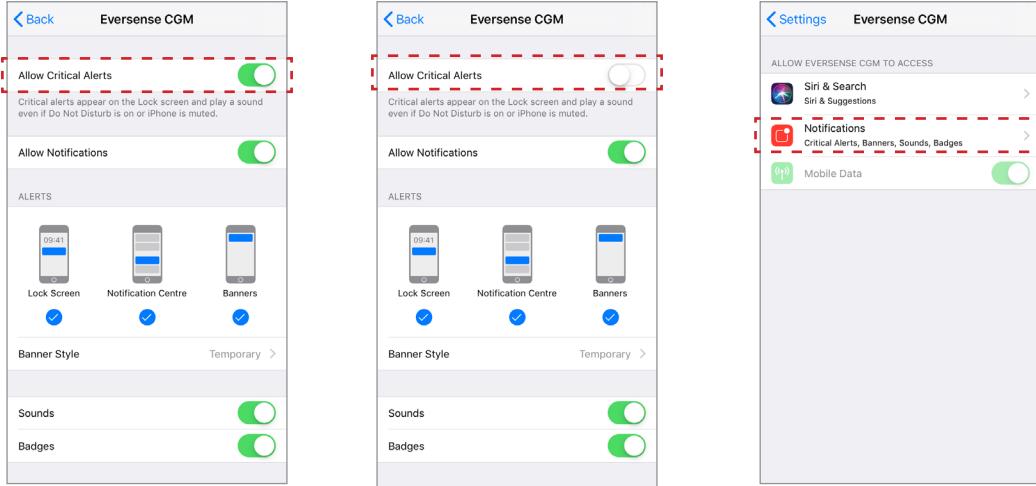


8

מכשורי אנדרואיד


עבור מכשורים עם אנדרואיד 6 ומעלה:

Eversense 3. לחץ על מעמוד הגישה 'נא לא להפריע'.

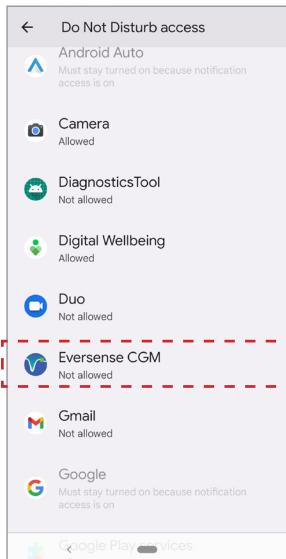


8


Settings 2. לחץ על (הגדרות).

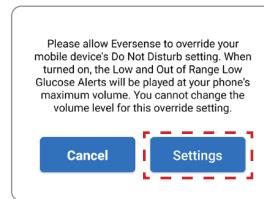

1. לחץ על הלוחן על מנת להפעיל את המעקף.

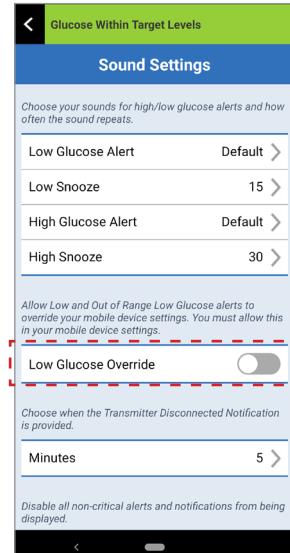


4. לחץ על Allow (אפשר).

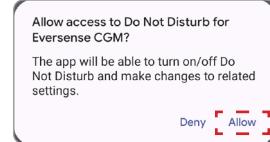

8


5. לחץ על החץ ליד ה-Eversense CGM עוקף הגדרת 'נא לא להפריע'.

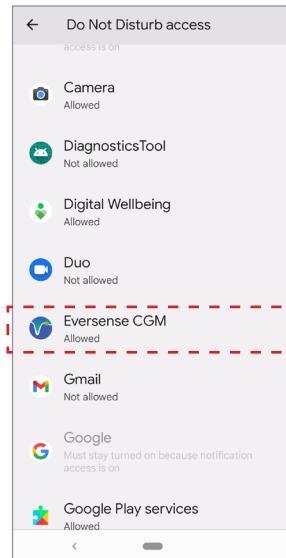

6. חזר אל האפליקציה לנוייד Eversense CGM

7. לחץ על מעקף של סוכר נמוך על מנת להציג את התוצאות סוכר נמוכות והתרעות סוכר נמוכות שלא נמצאות בטווין בעוצמת ציליל מקסימלית, גם כאשר הטלפון שלו נמצא במצב שקט/רטט או במצב 'נא לא להפריע'.

8

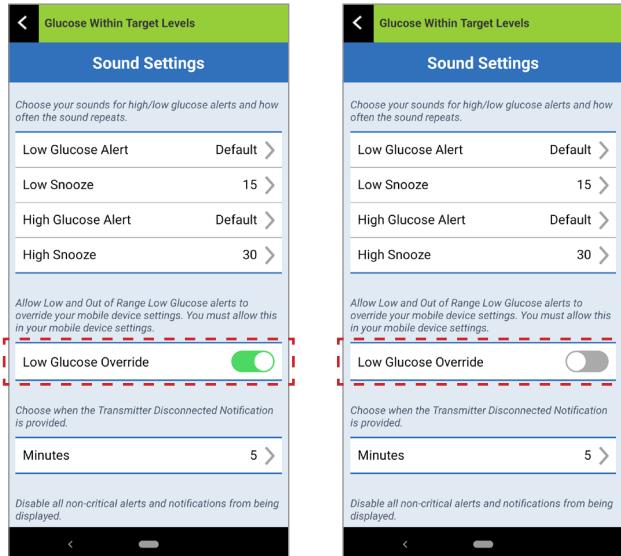



הערה: מאפיין זה דומה למאפיין שעון מעורר אשר יישמע תמיד ללא קשר להגדרות הצליל של הטלפון שלו.

הגדרת ניתוק משדר

אפשרים להיות זמינים בהם חיבור ה-Bluetooth בין המשדר החכם שלך והמכשיר הנייד מנותק. יכול להיות שהדבר קורה בגלל שהמכשיר איננו נמצא בטוווח, סוללת המשדר החכם ריקה או כאשר מאפיין Bluetooth כבוי בהגדרות הטלפון שלך. אתה יכול להתאים אישית את הזמן בו המערכת תודיע לך על ניתוק תקשורת. אתה יכול להגדיר התראת זמן של 5 עד 30 דקות לאחר שחיבור אבד. כאשר לא קיימת תקשורת בין המשדר החכם והאפאליקצייה, אתה מקבל רק התראות רטט מן המשדר החכם. עיין בחלק הבא בנוגע למצב 'נא לא להפריע'.

8

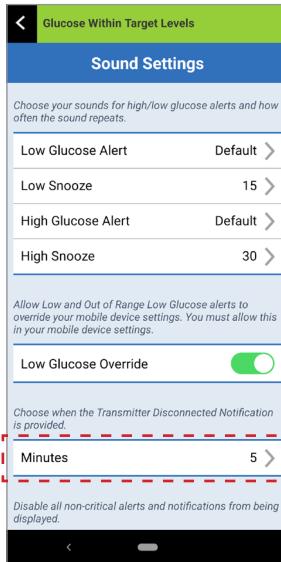

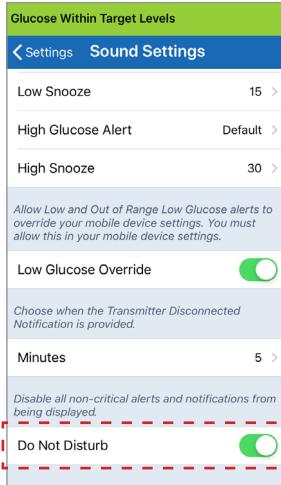

8

מסך **SOUND SETTINGS** (הגדרות צליל) מאפשר לך להפעיל או לנטרל את מצב 'נא לא להפריע'.

- **Do Not Disturb** (נא לא להפריע). מעביר את האפליקציה ואת המשדר החכם למצב 'נא לא להפריע'.

OFF (כובי) – כל ההודעות – התראות והודעות – ללא קשר למידת הקירטיות שלהן תסופקנה על ידי המשדר החכם והאפליקציה.

- **ON** (פועל) – רק התראות קritisיות תסופקנה על ידי האפליקציה ועל ידי התראות הרטט על הגוף של המשדר החכם.

הערה: כאשר אתה מפעיל את מצב 'נא לא להפריע' במכשיר הנייד שלך, אתה לא תקבל התראות או הודעות מאפליקציית Eversense סמל DND יופיע על גב מסך הבית. לרשימת התראות, אנא ראה **תיאורי התראות**.

נא לא להפריע באפליקציית Eversense ומכשירים ניידים

DND באפליקציית Eversense פועל; DND במכשיר הנייד פועל	DND באפליקציית Eversense כבוי; DND במכשיר הנייד פועל	DND באפליקציית Eversense פועל; DND במכשיר הנייד כבוי	DND באפליקציית Eversense כבוי; DND במכשיר הנייד כבוי	רטט משדר (הודעות והתרעות לא קרייטיות)
לא	כ	לא	כ	תציג אפליקציית Eversense, צליל טלפון ורטט טלפון (הודעות והתרעות לא קרייטיות)
לא	לא	לא	כ	רטט משדר (התרעות קרייטיות)
כ	כ	כ	כ	תציג אפליקציית Eversense, צליל טלפון ורטט טלפון (התרעות קרייטיות)
לא	לא	כ	כ	תזכורות כיון (הודעת טלפון)
לא	לא	כ	כ	התרעת סוכר נמוך (העברה מעל פועל)

חשיבות: חלק מערכות הפעלה של הטלפונים מאפשרות לך לעקוף את התרעות סוכר נמוך בהגדירות הצליל של הטלפון. ראה הגדרות צליל למידע נוסף.



הגדרת פרופיל זמן

בעת פעולות או תנאים מחוץ לשגרה הרגילה שלך, יכול להיות שתרצה להשתמש באופן זמני בהגדרות רמות סוכר שונות מן ההגדרות הסטנדרטיות אותן. מסך **TEMP PROFILE (פרופיל זמן)** מאפשר לך לשנות באופן זמני את ההגדרות רמות היעד והתרעה שלך למשך הזמן אותו תבחר. לאחר סיום תקופת הפרופיל הזמן, ההגדרות הסטנדרטיות אותן עברו רמות הסוכר ב-**Settings > Glucose (הגדרות>סוכר)** תוחזרנה באופן אוטומטי להיות פעילות.

- 2.** בחר את מושך הזמן. אתה יכול להגדיר פרופיל זמן לעד 36 שעות בתוספות של 30 דקות.

1. לחץ על **Menu > Settings > Temp Profile (פרופיל זמן) על מנת להציג את מסך TEMP PROFILE (פרופיל זמן).**

8

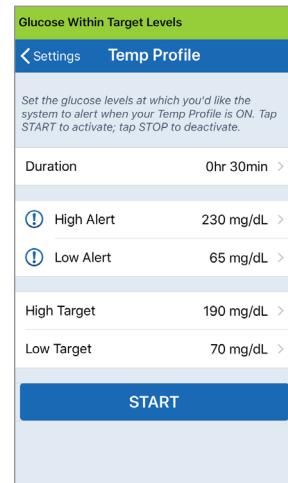
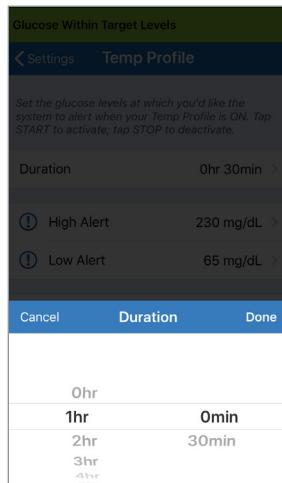


לא ניתן לשנות את בחרות הפרופיל הזמןי לאחר שמשך הזמן עברו הפרופיל הזמןי החל.

כאשר הפרופיל הזמןי פעיל, סמל הפרופיל **MY GLUCOSE** הזמןי יוצג על מסך (הסוכר שלי).




3. קבע את רמות התרעה ורמות היעד הגבוחות והنمוכות הרצויות. לחץ על START (התחל).

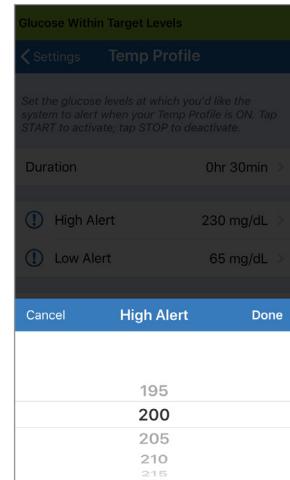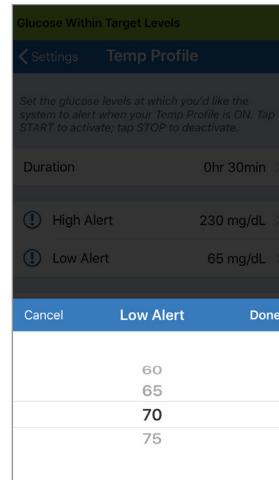


8

על מנת לסייע את הпроויל הזמןי מוקדם יותר ממה שנקבע, עברו אל **Settings > Temp Profile** והגדירות < פרופיל זמן< ולחץ על **STOP** (עצור).

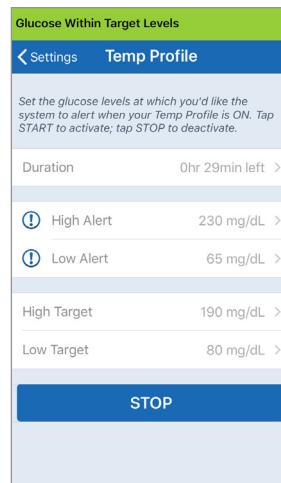

כasher meshr hprofil zmanei sotim, haaflikzitah tzig houda ul cr soomel hprofil zmanei la yizag yoter b'meser **MY GLUCOSE** (hstocer shel).

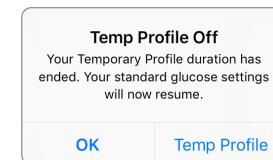

9. תיאורי התרעות

חלק זה מתאר את ההתרעות וההודעות השונות שתראה על מסכי אפליקציית *Eversense* ואת הפעולות שעליך לבצע.

מערכת-h CGM שלך מספקת התרעות והודעות הקשורות לקריאות סוכר ולסטוס המערכת הן על המשדר החכם שלך והן במכשיר הנייד. המשדר החכם מספק התרעת רטט על הגוף כאשר הקריאות הגיעו לרמת ההתרעה. האפליקציה במכשיר הנייד מספקת התרעת ציל' ומציגת מסר במסך **MY GLUCOSE** (הסוכר של'). הטבלה מטה מתארת את תכונות הרטט על המשדר החכם ואת המחוונים באפליקציה שלך.

9

מחוונים התרעת האפליקציה	tabniti_ratt_bemshdr_hachcm	התרעות והודעות
המסר מופיע בצע צהוב	3 רטטים ארוכים	התרעות כאשר אין אפשרות להציג ערכי סוכר דורשות פעולה מידית ומתאימה.
המסר מופיע בצע צהוב	3 רטטים קצרים X	התרעת סוכר נמוך דורשות פעולה מידית ומתאימה.
המסר מופיע בצע צהוב	3 רטטים קצרים	התרעות הקשורות לחיזוי נמוך ורמת סוכר נמוכות מחוץ לטווח דורשות פעולה מידית ומתאימה.
המסר מופיע בצע צהוב	רטט ארוך אחד ולאחר מכן 2 רטטים קצרים	התרעות הקשורות לרמות סוכר גבוהות התרעת רמת סוכר גבוהה, חיזוי גבוהה ורמת סוכר גבוהה מחוץ לטווח. דורשות פעולה מידית ומתאימה.

מחווני התreuעת האפליקציה	תבנית רטט במשדר החכם	התreuות והודעות
המסר מופיע ב泂בע צהוב	רטט אחד קצר	התreuות הקשורות לעניינים פחות קרייטיים נדרשת פעולה כלשהי, אך בעלת אופי שאינו קרייטי. דוגמאות נמצאות בחלק הבא.
המסר מופיע ב泂בע צהוב	3 רטטים מהירים ולאחר מכן רטט ארוך 2 x	התreuת הטען את המשדר החכם למשדר החכם שלר יש עוצמת סוללה נמוכה ויש להטעין אותו.
המסר מופיע ב泂בע כחול	רטט אחד קצר	הודעות נדרשת פעולה כלשהי, אך בעלת אופי שאינו קרייטי. דוגמאות נמצאות בחלק הבא.

Alert History (ההיסטוריה של התרעות)

מסך ALERT HISTORY (ההיסטוריה של התרעות) כולל רשימה של התרעות והודעות אותן קיבלת.

הסמלים הבאים משמשים על מנת להראות את רמת החומרה של המסרים.



9

הערה: כאשר אתה מקבל שתי התרעות או יותר אשר לא נצפו, האפליקציה מציגה אפשרות Dismiss All (בטל הכל). הדבר עשוי להתרחש כאשר המכשיר החדש שלך היה מחוץ לטווח הקליטה של המשדר החכם שלך ולאחר מכן מtbody סנכiron מחדש. אתה יכול לראות מחדש כל התרעה ב-Alert History (ההיסטוריה של התרעות).

2. אתה יכול לבחור לכלול רק מסרים מסוימים (התרעות והודעות וכו') להציג על ידי לחיצה על איקוני ההתרעה הנבחרים.

- לחץ על **ALL** (הכל), ולאחר מכן על חץ על הסמלים בחלק העליון של המסך על מנת לבחור את סוג ההתרעות אוותם תרצה להציג.
- לחץ על **Menu** (תפריט) לאחר הסיום.



דוגמה להתרעות בלבד

1. לחץ על **Menu > Alert History** (תפריט > היסטוריית התרעות).

- מוך **ALERT HISTORY** (ההיסטוריה) התרעות יציג רשימה של כל ההתרעות וההודעות שהתקבלו באותו יום.
- לחץ על כל מסר לקבלת מידע נוסף.

Glucose Within Target Levels		
Alert History		
ALL	Yellow	Blue
Tuesday, April 12, 2022		
(-) Transmitter Replacement	12:37 >	
(!) Low Glucose	12:36 >	
(!) High Glucose	12:36 >	
(!) Out of Range Low Glucose	12:36 >	
(!) Out of Range High Glucose	12:35 >	
(-) Calibration Past Due	12:34 >	
(-) Calibration Expired	12:34 >	
(-) Battery Empty	12:33 >	
Tue 12 April, 2022		



דוגמה לכלום

תיאורי התרעות ופעולות

הטבלה הבאה מציגה את התרעות וההודעות אותן תוכל לקבל באפליקציית Eversense.

חשיבות: לא ניתן לקבל התרעות המסומנות ב-*, באפליקציה או במכשיר החכם על ידי שימוש ב-DND בהגדירות האפליקציה.

התרעות

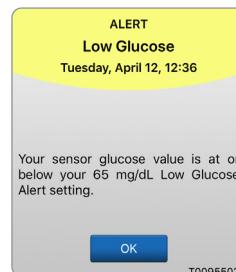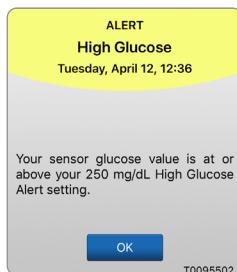

תאורים אפליקציה

9

High Glucose (סוכר גבוה)

מופיעה בטווח הזמן אותו הזנת בהגדירות הצליל כאשר קריאות הסוכר של החישון שלך שווה או מעלה לרמת ההתרעה עבור רמות סוכר גבוהות יותר הגדרת. מרוחק הזמן לחזרה על ההתרעה כבירת מחדל הוא 30 דקות.

Low Glucose (סוכר נמוך)*

מופיעה בטווח הזמן אותו הזנת בהגדירות הצליל כאשר קריאות הסוכר של החישון שלך שווה או מתחת לרמת ההתרעה עבור רמות סוכר נמוכות יותר הגדרת. מרוחק הזמן לחזרה על ההתרעה כבירת מחדל הוא 15 דקות.

תאואר



שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחישון, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בدم בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחישון, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

פעולות

תיאורי התרעות ופערות (המשך)

התרעות

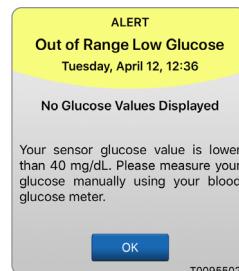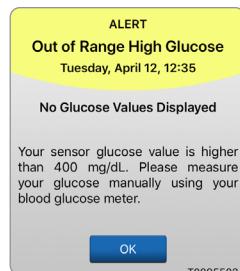



9

תיאור אפליקציה

<p>*Out of Range High Glucose (סוכר גבוי מחוץ לטווח) מופיעעה כאשר רמת הסוכר שלך גבואה מ-400 מ"ג/ד"ל. לא ניתן להציג קרייאות סוכר (רק HI (גבואה) מוצגת במסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי)).</p> <p>אשר את רמות הסוכר שלך על ידי בדיקת סוכר בدم לפני כל ההחלטה טיפול. אשר ערך רמת הסוכר המגיע מן החישון היה 400 מ"ג/ד"ל או נמוך יותר, קרייאות הסוכר יוצגושוב.</p>	<p>Out of Range Low Glucose (סוכר נמוך מחוץ לטווח)* מופיעעה כאשר רמת הסוכר שלך נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל. לא ניתן להציג קרייאות סוכר (רק LO (נמוך) מוצגת במסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי)).</p> <p>אשר את רמות הסוכר שלך על ידי בדיקת סוכר בדם לפני כל ההחלטה טיפול. אשר ערך רמת הסוכר המגיע מן החישון היה 40 מ"ג/ד"ל או גבואה יותר, קרייאות הסוכר יוצגושוב.</p>
---	---

תיאורי התרעות ופועלות (המשך)

התרעות

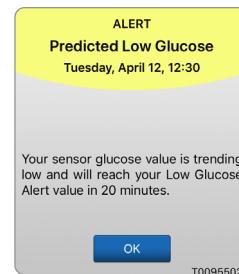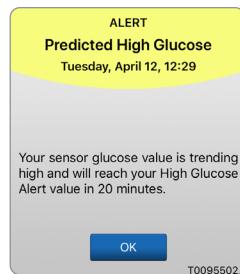

תיאוגט אפליקציה

9

(סוכר חזוי גבוה) Predicted High Glucose

מופיעה מדי 60 דקות כאשר מגמת ערכיו הסוכר נמצאת בעלייה ותגיע לרמת ההתרעה על סוכר גבוהה שהגדרת בטור פרק הזמן שהזנת בהגדרות.

(סוכר חזוי נמוך) Predicted Low Glucose

מופיעה מדי 60 דקות כאשר מגמת ערכיו הסוכר נמצאת בירידה ותגיע לרמת ההתרעה על סוכר נמוך שהגדרת בטור פרק הזמן שהזנת בהגדרות.

תיאו



שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך שונים מערך הסוכר בחוישן או למה שההתרעה מצינית, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בدم בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך שונים מערך הסוכר בחוישן או למה שההתרעה מצינית, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

פעולות

תיאורי התרעות ופועלות (המשך)

התרעות

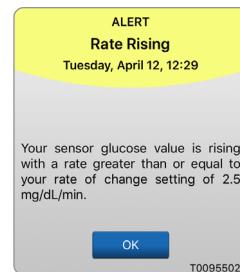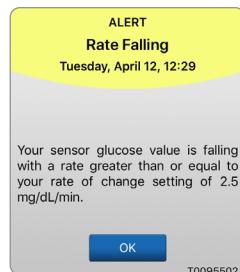

9

תיאור אפליקציה

Rate Falling (קצב ירידה)

מופיעה כל 60 דקות כאשר רמות הסוכר שלך נופלות בשיעור השווה או הגבוה מקצב השינויו. אותו הזמן בהגדרות.

Rate Rising (קצב עלייה)

מופיעה כל 60 דקות כאשר רמות הסוכר שלך עולות בקצב השווה או הגבוה מקצב השינויו. אותו הזמן בהגדרות.

תיאור

שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמיינים ומגמות. אם התסמיינים שלך שונים מערך הסוכר בחוישן או למה שההתרעעה מצינית, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בدم בעזרת דגימות דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמיינים ומגמות. אם התסמיינים שלך שונים מערך הסוכר בחוישן או למה שההתרעעה מצינית, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימות דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.


פועלות

תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

התרעות

9

הציגות אפליקציה

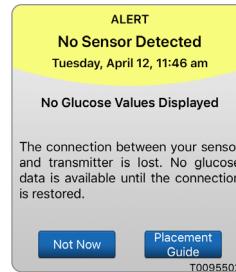

Sensor Replacement (החלפת חישון)*

מופיעה כאשר הבדיקה העצמית של המערכת מأتורות שהחישון אינו מסוגל יותר לספק ערכי סוכר. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד להחלפת החישון.

No Sensor Detected (לא אותר חישון)*

מופיעה כאשר החיבור בין החישון של והמושדר אבד. אין נתוני סוכר זמינים עד אשר מתבצע חיבור מחדש.

צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת להחליף את החישון שלך.


כאשר אתה עושה שימוש במדריך המיקום לעיון, הניח את המושדר החכם מעל לחישון עד אשר ניתן לראות שקיים חיבור.

תיאור

פעולות

תיאורי התראות ופעולות (המשך)

התראות

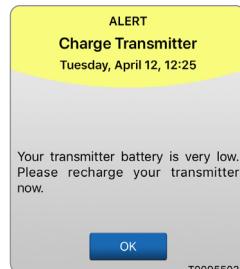

9

Charge Smart Transmitter (הטען את המשדר החכם)*

מופיעה כאשר עצמות סוללת המשדר החכם נמוכה מאוד ועליר לטען את הסוללה בהקדם.

Sensor Replacement (החלפת חיישן)*

מופיעה כאשר פג תוקפו של חיישן. לא ניתן להציג קרייאות סוכר עד להחלפת החישן.

תאוגט אפליקציה

תאור



פעולות

טען את המשדר החכם שller בהקדם האפשרי.

צור קשר עם הצוות הרפואי שller על מנת להחליפ את החישן שלך.

תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

התרעות

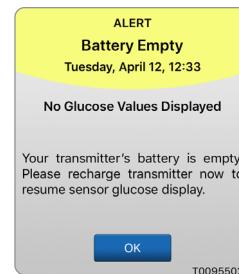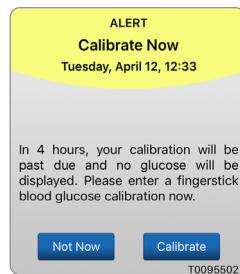

הצוגת אפליקציה

9

Calibrate Now (כיף עכשו!)

מופיעה על מנת להתריע על שה��ען הזמן לכיוול. אם אתה לא מבצע כיוול תוך 4 שעות, לא ניתן יהיה להציג קריוטות סוכר.

Battery Empty (סוללה ריקה)*

מופיעה פעם לאחר אשר סוללת המשדר החכם ריקה ויש לטעון אותה. לא ניתן להציג קריוטות סוכר עד אשר לא תתבצע טעינה של המשדר החכם.

לחץ על Calibrate (כיף) בצד ימין ערך כיוול.


הטען את המשדר החכם מיד. הסר את המשדר החכם מן הגוף שולך לפני חיבורו למקור מתח.

תאזר

פעולות

תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

התרעות

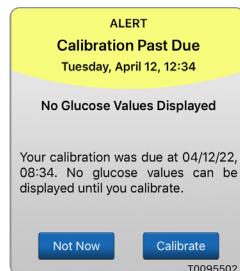

9

האזהרת אפליקציה

תאזר

פעולות

Calibration Past Due (איחור במייל)
מופיע כאשר המערכת שלך צריכה להיות כבר לבצע ציול (16 שעות בשלב 2 כיוילים יומיים ו-28 שעות בשלב 1 ציול יומי).
לא ניתן להציג קריואות סוכר עד אשר לא יבוצע ציול.

בצע בדיקת ציול בעזרת דם מהאצבע על מנת להציגשוב את קריואות הסוכר שלך.

Sensor Suspend (השעיה חישון)
מופיע כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מأتירה צורך להתחיל מחדש את שלב האתחול עבור בדיקות ציול נוספת.
לא ניתן להציג קריואות סוכר עד לכיוול שני מוצלח.


אתחול מחדש של המערכת יכול בעוד 6 שעות.
קריואות רמות הסוכר תציגנהשוב כמו דקוט לאחר ביצוע מוצלח של בדיקת הכיל השניה של שלב האתחול.

תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

התרעות

האגות אפליקציה

9

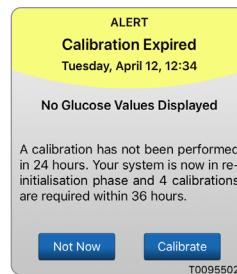

Transmitter End of Life Day 366

(סיום חי המשדר יומם 366*)

מופיעה פעמי ב-7 ימים כאשר המשדר שלו כבר היה בשימוש 365 ימים ואחריות המשדר שלו הסתיימה. לאחר 395 ימי שימוש, המשדר שלו לא יספק יותר קריאות סוכר.

Calibration Expired (פג תוקף הכיוול)

מופיעה כאשר לאבוצע כיוול בתוך 24 שעות כאשר המערכת נמצאת בשלב 2 כיוולים יומיים או כאשר לאבוצע כיוול בתוך 40 שעות כאשר המערכת נמצאת בשלב 1 כיוול יומי. המערכת חוזרת לשלב ההתחול.

לא תציגנה קריאות סוכר עד אשר לא יבוצע כיוול.

צור קשר עם המפץ שלו על מנת להזמין משדר חדש.

בשלב ההתחול, עליך לבצע 4 בדיקות כיוול בעזרת דם מהאצבע במרוחקים של שעתיים עד 12 שעות. קריאות רמות הסוכר תציגנה שוב לאחר ביצוע מוצלח של בדיקת הכיוול השנייה בעזרת דם מהאצבע.

הערה: בכל אחד משלבי הכיוול, אם ערך מזון של כיוול מאד שונה מערך הסוכר של חישון המערכת, אתה תتابקש לבצע כיוול חוזר. אם לא תבצע כיוול בתוך 16 שעות, לא תציגנה קריאות סוכר ולאחר 24 שעות לא כיוול, המערכת תחזיר אל שלב ההתחול.

תאזר

פעולות

תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

התרעות



9

Transmitter End of Life Day 396 (סיום חי המשדר יום *396)

מופיעה כאשר נעשה שימוש במשדר שלך במשך 395 ימים. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר תחליף את המשדר שלך. אם המשדר שלך הגיע לסוף חייו ולא ניתן לקשר אותו אל חישון.

צור קשר עם המפיז שלך על מנת להזמין משדר חדש.

Transmitter End of Life Day 395 (סיום חי המשדר יום *395)

מופיעת לאחר שארחיות המשדר שלך הסתיימה לפני יותר מ-30 ימים. לא ניתן להציג קריאות סוכר לאחר תאריך התרעעה זו עד אשר תחליף את המשדר שלך.

צור קשר עם המפיז שלך על מנת להזמין משדר חדש.



האゴת אפליקציה

תיאור

פעולות

תיאורי התראות ופערות (המשר)

התראות

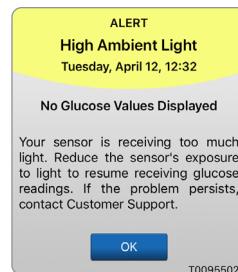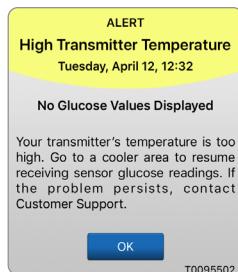

תאוגט אפליקציה

9

High Smart Transmitter Temperature

(טמפרטורה גבוהה של המשדר החכם)*

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה
של המשדר החכם גבוהה מדי.

לא מוצגות קריומות סוכר עד אשר טמפרטורת
המשדר החכם חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה
הנורמלי.

הפחת את טמפרטורת המשדר החכם על ידי
הציגו למקומות קריר יותר. לאחר שהטמפרטורה
של המשדר החכם תגיע אל מתחת ל-42°C (108°F),
הוא ייחזר ויציג קריומות סוכר.

אתה יכול להסיר באופן זמני את המשדר החכם
על מנת לקרר אותו. לאחר שטמפרטורת המשדר
החכם ירדיה, הנהו אותושוב מעל לחישון.

High Ambient Light (תאורת סביבה חזקה)

מופיעה כל 60 דקות כאשר החישון שלך מקבל
יוטר מדי תאורת סביבה, דבר המשפיע על
היכולת שלו לתקשר עם המשדר החכם.

לא ניתן להציג קריומות סוכר עד להפחיתה עצמה
תאורת הסביבה.

תאואר


פערות

הפחת את עצמת תאורת הסביבה בביוץ אחד
או יותר מהפערות הבאות:

- זוż לאזר אשר פחות חשוף לאור.
- הנה פיסת بد כהה מעל למשדר החכם.
- לבש את המשדר החכם מתחת לבגדים.

תיאור התרעות ופעולות (המשך)

התרעות

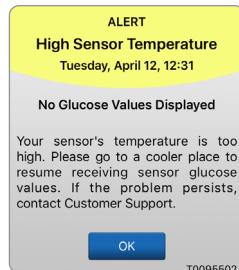

9

High Sensor Temperature

(טמפרטורת חישון גבוהה*)

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של החישון גבוהה מדי.

לא מוצגות קריאות סוכר עד אשר טמפרטורת החישון חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.

Low Sensor Temperature

(טמפרטורת חישון נמוכה*)

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של החישון נמוכה מדי.

לא מוצגות קריאות סוכר עד אשר טמפרטורת החישון חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.

האגות אפליקציה

תאזר



פעולה

עבור לסביבה קרה יותר על מנת להפחית את טמפרטורת החישון שלך. הסר לזמן קצר את המשדר החכם שלך עד אשר טמפרטורת תימצא בטוווח ($^{\circ}\text{F}$) 81 - 104 ($^{\circ}\text{C}$) 26-40. לאחר מכן תימצא בטוווח ($^{\circ}\text{F}$) 81 - 104 ($^{\circ}\text{C}$) 26-40. לך המשדר החכם למקומו על מנת להתחילה לקבל קריאות רמות סוכר מן החישון.

עבור לסביבה חמה יותר על מנת להעלות את טמפרטורת החישון שלך. וודא שהמשדר החכם שלך מופעל על מנת שתוכל להתחילה ולקבל רמות קריאות סוכר כאשר טמפרטורת החישון נמצאת בטוווח ($^{\circ}\text{F}$) 81 - 104 ($^{\circ}\text{C}$) 26-40.



תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

התרעות

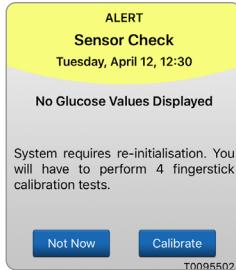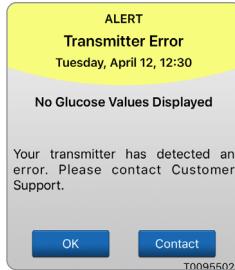תיאור אפליקציה	תאואר	פעולה
	Sensor Check (בדיקה חישון) מופיעה פעם אחת כאשר הבדיקות הפנימיות של המערכת מצהוות חוסר יציבות של החישון שמחיבת זהירה לשלב אתוחול הכיוול. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד לאחר הזנה של כיוול שני מוצלח.	Smart Transmitter Error (שגיאת משדר חכם)* מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מأتרת שגיאת משדר החכם. לא מוצגות קריאות סוכר עד שהשגיאה תתוקן.
	בעקבות הצעדים המוצגים בחלק איתור וטיפול בעויות על מנת לאותחול את המשדר החכם שלו. אם אין מסוגל להשלים את האותחול, צור קשר עם שירות לקוחות.	בשלב האותחול, עליך לבצע 4 בדיקות כיוול בעזרת דם מהאצבע במרווחים של שעתיים עד 12 שעות. קריאות רמות הסוכר תזגינהשוב לאחר ביצוע מוצלח של בדיקת הכיוול השנייה בעזרת דם מהאצבע.

תיאורי התראות ופעולות (המשך)

התראות

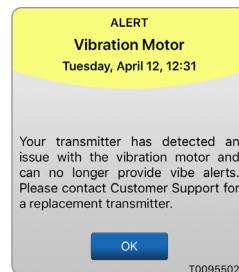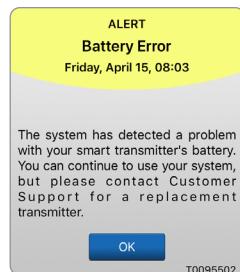

9

תיאור אפליקציה

*שגיאת סוללה (Battery Error)

מופיעעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מארתת שגיאת סוללה במשדר החכם שלך. קרייאות הסוכר תהינה מוגנות אבל יהיה צורך להחליף את המשדר החכם שלך.

*מנוע רטט (Vibration Motor)

מופיעעה כל 60 דקות כאשר מנע הרטט על גבי המשדר החכם שלך לא יכול לספק יותר התראות רטט על האגן. אתה תנסה לקבל קרייאות רמות סוכר עד לכ-72 שעות לאחר קבלת המסר. לאחר 72 שעות, אתה תקבל התראת שגיאת משדר חכם כל 20 דקות עד אשר תחליף את המשדר החכם.

צור קשר עם המפיצ'ן שלך על מנת להחליף משדר חדש.

צור קשר עם שירות הלקוחות על מנת להחליף מיד את המשדר החכם שלך.

תיאור



פעולות

תיאורי התראות ופעולות (המשך)

התראות

הטוגת אפליקציה

9

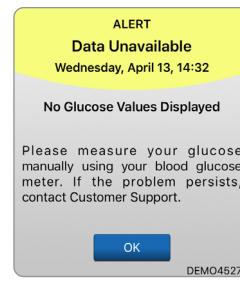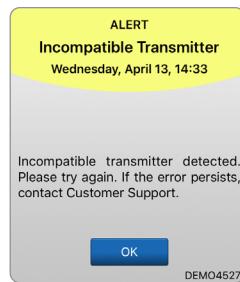

Incompatible Transmitter Detected

(אותר מושדר לא תואם*)

מופיעה במהלך הקישור כאשר המערכת מודדת מושדר אשר אינו תואם אל החישון.

Data Unavailable (נתונים לא זמינים)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאיימת שגיאת מערכת.
לא מוצגות קריומות סוכר עד שהשגיאה תתוקן.

נסה קישור מחדש. אם השגיאה מופיעה שוב
בניסיון השני, צור קשר עם שירות לקוחות.



חבר את עריסת הטעינה באמצעות כבל אל שקע
קיר או יציאת USB. הנח את המושדר החכם
בתוך העריסה והסר אותו. אם הבעה ממשיכה,
עקוב אחר הצעדים המוצגים בחלק איתור וטיפול
בבująת על מנת לאטחל את המושדר החכם שלו.
אם אין מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר
עם שירות לקוחות.

תיאור

פעולות

תיאורי התראות ופעולות (המשר)

התראות

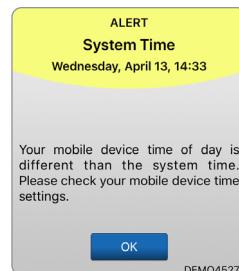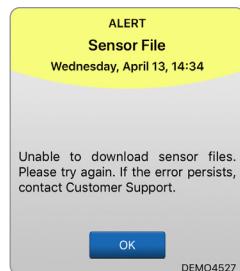

9

Sensor File Error (שגיאת קובץ חישון)*
מופיעה כאשר המערכת מأتarta בעיה בעת הקישור.

System Time Error (שגיאת זמן מערכת)
מופיעה כאשר המערכת שלר מأتatta א' התאמה בין שעון המכשיר הנייד שלר ושעון המערכת.

תיאוגט אפליקציה

תיאור

פעולות

נסח קישור מחדש. אם השגיאה מופיעה שוב בכניסון השני, צור קשר עם שירות לקוחות.


הגדר את שעון המכשיר הנייד שלר אל הזמן המקומי. אם הנושא ממשיך, צור קשר עם שירות לקוחות.

תיאורי התראות ופעולות (המשך)

התראות

תאוגות אפליקציה

9

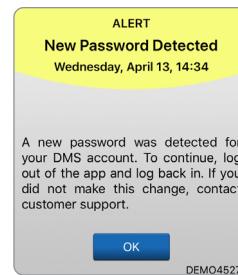

Log Out Required

(נדרשת יציאה מן המערכת)

מופיעה כל 24 שעות עבור משתמשי iOS או כאשר המערכת מארתת שפרט הכניסה של Eversense אינם זמינים דרך מאפיין מחזיק ל-Eversense המפתחות של iOS.

צא מן האפליקציה בטלפון הנייד וכנס אליה חזרה עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים שלך.

New Password Detected

(זוהתה ססמה חדשה)


מופיעה כאשר המערכת מארתת שינוי של ססמה באמצעות חשבון ה-DMS של Eversense.

תיאור

פעולות

תיאורי התראות ופעולות (המשך)

התראות

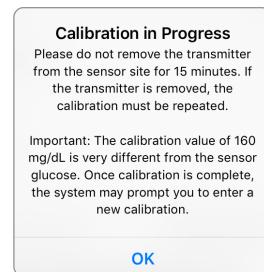

9

Calibration In Progress (מתבצע כיול)

מופיעעה כאשר ערך הçıול שלך שולר שנונה באופן
משמעותי מעריך רמת הסוכר שלך שאוורה
על ידי החישון.

App Performance (ביצוע אפליקציה)*

מופיעעה כל יום עבור מערכות הפעלה מסווג
אנדרואיד כאשר המערכת מתארת נפילות
אפליקציה בתדרות גבוהה בגל הכללה של
אפליקציה Eversense בהגדרות מטובי הסוללה.

אין להסיר את המשדר במהלך 15 דקות.
בעוד כיול חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

עבור אל הגדרות מטובי הסוללה שלך וכבה אותן
עבור אפליקציית Eversense על מנת להבטיח
שהתרעות ה-Eversense מגיעות ללאஇஒரு.

הציג אפליקציה

תיאור

פעולות



תיאורי התרעות ופערות (המשך)

התרעות

תיאור אפליקציה	תיאור	פערות
<p>Warning If you logout, you won't be able to see glucose data on the Eversense App until you log back in. Are you sure you want to logout?</p> <p>No Yes</p>	<p>Incompatible Transmitter Software Incompatible Transmitter Software detected. Please contact Customer Support.</p> <p>OK</p>	<p>Log Out Warning (אזהרת יציאה מן המערכת) מופיעה כאשר אתה מנסה לצאת מתווך האפליקציה בטלפון הנייד. אם יצא מן המערכת, לא תוכל לראות נתונים סוכר באפליקציית Eversense.</p> <p>הישאר מחובר לאפליקציה בטלפון הנייד על מנת להמשיך לראות את נתוני הסוכר שלך. אם תנתנק, יהיה عليك להיכנס אליה שוב באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך כדי שתוכל להמשיך להשתמש באפליקציה.</p>
	<p>Incompatible Transmitter Software (תוכנת משדר לא תואמת) מופיעה כאשר התוכנה במשדר החכם אינה תואמת לארסת אפליקציית CGM Eversense CGM במכשיר הנייד שלך.</p>	<p>צורך קשר עם שירות לקוחות.</p>

תיאורי התראות ופעולות (המשך)

התראות

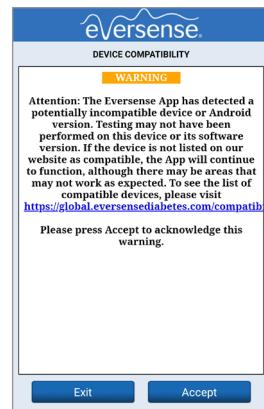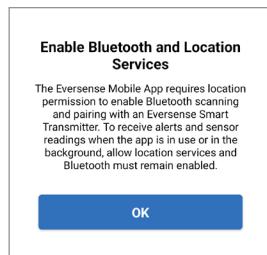

9

תוצאות אפליקציה

Enable Bluetooth and Location Services (אפשר Bluetooth ושירותי מיקום)
עboro אנדרואיד בלבד. מסבירה שהשימוש בשירותי המיקום נכון על מנת לאפשר את ה-BLuetooth ולקלול התראות.

Incompatible Device/Operating System (מכשיר/מערכת הפעלה לא תואמים)
מופיעה כאשר נעשה שימוש במכשיר/מערכת הפעלה לא מתאימים ביחד עם האפליקציה.

תאזר


לחץ על **OK** להכרה.

לרשימת מכשירים/מערכות הפעלה מתאימים אני בקר באתר <https://global.eversensediabetes.com>.

פעולות

תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

התרעות

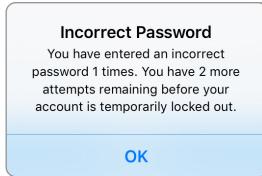תיאור אפליקציה	תיאור	פעולות
	<p>Incorrect Password (סיסמה שגויה) מופיעה כאשר המערכת מאתרת ססמה אחת או יותר שגויות אשר הוזנו באופן עוקב אל תוך האפליקציה שלך.</p>	<p>New Password Detected (זוהתה ססמה חדשה) מופיעה כאשר המערכת מאתרת שינוי של ססמה באמצעות חשבון ה-Eversense DMS שלך.</p>
	השתמש בססמה הנכונה והיכנס אל האפליקציה.	צא מן האפליקציה וכנס אליה חזרה עם הססמה החדשה.

תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

התרעות

תגובה אפליקציה

9

Delete Account

If you have created an Eversense account, you have the option to delete your account. If you delete your account, it is permanent, and you will no longer have access to your CGM data on the Eversense Mobile App, or in your Eversense DMS account. If you are using the Eversense NOW Mobile App, you will no longer be able to remotely view Eversense CGM data.

You cannot use the same email address to create a new account. If you still want to delete your account, please contact your local Eversense customer support team.

OK

Account Locked for 30 Minutes

You have entered an incorrect password 3 times. For security, your account is temporarily locked. Please try again at 14:27.

OK

Delete Account (מחק חשבון)
אפשרה כאשר לוחצים על 'מחק חשבון'
בעמוד הכניסה אל המערכת.

Account Locked (חשבון ננעל)
אפשרה לאחר שלוש ספניות שגויות הזמן
באופן עוקב אל תוך האפליקציה שלך.

תואר

צור קשר עם שירות הליקוחות אם אתה
רוצה להמשיך.

חכה 30 דקות. היכנס אל המערכת באמצעות
הסיסמה הנוכחית ואפס את הסיסמה שלך.



פעולות

תיאורי התראות ופעולות (המשך)

הודעות

התגות אפליקציה

9

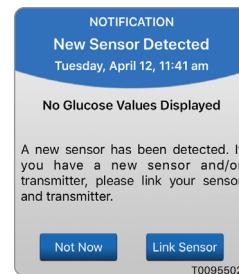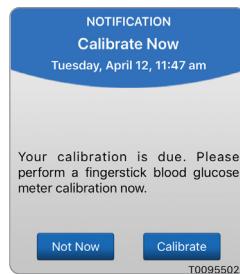

Calibrate Now (כיל עכשו)
מופיעה כאשר הגע הזמן לכיל כשר המערכת נמצאת בשלב האתחול או לאחר שהוזן ערך כויל אשר מאוד שונה שונה מערך הסוכר בחיישן.

New Sensor Detected (זיהה חישון חדש)
מופיעה כאשר המשדר החכם מאתר חישון חדש. יש לקשר בין החישון והמשדר החכם על מנת להתחילה בתקשורת.



בצע בדיקת רמת סוכר בעזרת דם מהאצבע והזין את הקריאה כערך הכלול שלך. אל תשתמש בקריאת דגימה ממוקם אחר (כגון אמת היד) לקבלת קרייאות הסוכר בדם שלך.

לחץ על **Link Sensor** (קשר חישון) על מנת להשלים את תהליך הקישור ולהתחליל את תקופת החימום הנמשכת 24 שעות. אין צורך לשאת את המשדר החכם שלך מעל לחישון עד סיוםה של תקופת החימום.

תאורה

פעולות

תיאורי התרעות ופעולות (המשך) (הודעות) Notifications

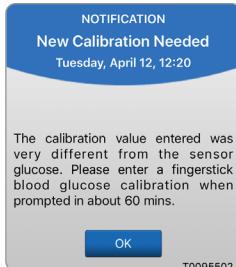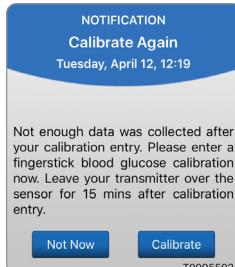תיאור פעולה	תיאור	הצגת אפליקציה
<p>New Calibration Needed (יש צורך בכיוול חדש)</p> <p>מופיעעה כאשר ערך הכויל שהזנת שונה מאוד מררך רמת הסוכר שלך שאutorה על ידי החישון. לאחר כשעה אחת, אתה תקבל הודעה כייל עכשו.</p> <p>הן ערך כיוול חדש כאשר תתקבקש לעשות זאת.</p>	<p>Calibrate Again (כイル שוב) מופיעעה כאשר לא נאספו מספיק נתונים במהלך הכויל.</p> <p>לחץ על Calibrate (כイル) כדי להזין ערך כיוול חדש.</p>	 

תיאורי התרעות ופעולות (המשך) (הודעות) Notifications


9

תגובה אפליקציה



Sensor Replacement (החלפת חישון)
מופיעה 60, 30, 14, 7, 3 יום אחד לפחות סיום
תקופת הנשיאה של החישון שלו כמצורמת
שאתה צריך להחליף את החישון שלו.

תיאור

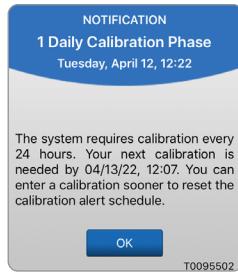


1 Daily Calibration (כiol 1 יומי)
מופיעה כאשר המערכת מצריכה כiol פעם
אחת ב-24 שעות.

פעולות

צורך קשר עם הצוות הרפואי שלו על מנת לקבוע
טור להסרת החישון והחלפתו.

הэн ערך כiol חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

תיאורי התראות ופעולות (המשך) (הודעות) Notifications

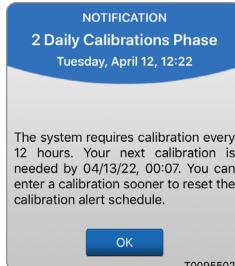תיאור פעולה	תיאור	תאוגט אפליקציה
 Transmitter End of Life Day 330 (סיום חי המשדר יומ 330) מופיעה פעם אחת 35 ימים לפני סיום אחריות המשדר.	2 Daily Calibrations (2 כוילים ביום) מופיעה כאשר המערכת מצריכה כויל פעמיים ביום.	
צור קשר עם המפיץ שלו על מנת להזמין משדר חדש.	הэн עריך כויל חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.	

10. יומן אירועים

חלק זה מתאר איך לראות מחדש מחדש אירועים על מנת לעקוב ביתר קלות אחר מגמות סוכר.

מערכת Eversense E3 CGM מאפשרת לך לטעד ולעקוב אחר אירועים נוספים לניטור רציף של רמות הסוכר שלך. אתה יכול להזין באופן יידי אירועים אשר יופיעו על גבי גרף המגמה ודוחות סוכר על מנת לעזור לך למצוא מגמות בפרופיל הסוכר שלך.

סוגי אירועים:

סוכר 

ארוחות 

איןסולין 

בריאות 

פעילות גופנית 

10

הערה: אתה יכול גם להיכנס אל מסך **ADD EVENT** (הוסף אירוע) הישר ממסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי) על ידי לחיצה בודדת בכל מקום בשטח הגרף.

ראה אירועים

אתה יכול לראות אירועים שהזנו בעבר במסך **EVENT LOG** (יום אירועים).

Glucose Within Target Levels	
Event Log +	
ALL	...
Friday, April 15, 2022	
Exercise, 1hr 0min	21:35 >
Health, Fever	21:35 >
Insulin, 2.0 units	21:34 >
Breakfast, 15 grams	21:34 >
Glucose, 99 mg/dL	20:12 >
Calibration, 101 mg/dL	19:53 >
Calibration, 105 mg/dL	09:09 >
Thursday, April 14, 2022	
Glucose, 100 mg/dL	12:22 >
Fri 15 April, 2022	

1. לחץ על **Menu > Event Log** (תפריט > יום אירועים).

מסך **EVENT LOG** (יום אירועים) יופיע.

2. כל אירועים אותם הזנת יופיעו.

אתה יכול גם לבחור גם לראות סוגי אירועים ספציפיים על ידי לחיצה על סוג אירוע מסוים.

- לחץ על **ALL** (הכל), ולאחר מכן לחץ על האיקונים בחלק העליון של המסך על מנת לבחור רק את סוגי האירועים שתרצה לראות.

תעד אירועים ספציפיים

סוכר



הזמן ועקבות אחר בדיקות הסוכר בדם (תוצאות בדיקות אחרות מהתוצאות בבדיקה הכתול).

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Glucose	Save
Time	April 12, 2022 14:13 >	
Glucose	100 mg/dL >	
Notes	>	

Glucose Within Target Levels		
Event Log		+
ALL	⌚	⌚
Tuesday, April 12, 2022		
Calibration, 104 mg/dL 11:50 >		
Monday, April 11, 2022		
<input checked="" type="radio"/> Glucose <input type="radio"/> Meal <input type="radio"/> Insulin <input type="radio"/> Health <input type="radio"/> Exercise <input type="radio"/> Cancel		

10

1. לחץ על **Menu > Event Log** (תפריט > יומן אירועי).

2. הוסף אירוע על ידי שימוש באיקון האירוע **Glucose < +**.

3. לחץ על **Time** (זמן) על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים. לחץ על **Done** (בוצע).

4. לחץ על **Glucose** (סוכר) על מנת להזין את הערך המתאים עבור הסוכר הדם. לחץ על **Done** (בוצע).

הערה: תוכל להזין ערך סוכר בין 20 ל-600 מ"ג/ד".ל. ערכים מתחת ל-20 מ"ג/ד"ל יומרו ל-20, וערכים מעל 600 מ"ג/ד"ל יומרו ל-600 למטרות חישוב ותצוגה.

5. לחץ על **Save** (שמירה).

Confirm Glucose	
Time: Apr 15, 2022 10:42 am	
Value: 100 mg/dL	
Cancel	Submit

אנדרואיד

Confirm Glucose	
Time: Apr 12, 2022 14:13	
Value: 100 mg/dL	
Cancel	Submit

iOS

6. בתוך תיבת אישור הסוכר הקופצת, לחץ על **Submit** (שליח) על מנת לאשר את אירוע הסוכר וחזור אל מסך **EVENT LOG** (יומן אירועי), או לחץ על **Cancel** (ביטול) על מנת לצאת מבלי לשמר את השינויים או לערור את המידע לפני שמירה.

הערה: אירועי סוכר לא מחליפים מדדיות כיול. אתה עדין צריך להזין את קריומות הכתול.

ארוחות



הזמן סוג של ארוחה, תאריך ושעה וספירת פחמיימות.

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Meal	Save
Time	Apr 12, 2022 14:14 >	
Type	Breakfast >	
Carbs	15 grams >	
Notes	>	

10

1. לחץ על Log (תפריט < יומן אירועים).

2. הוסף אירוע על ידי שימוש באיקון האירוע “+” ארוחות Meals.

3. לחץ על Time (זמן) על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים.
לחץ על Done (בוצע).

4. לחץ על Type (סוג) על מנת להזין את סוג הארוחה.
לחץ על Done (בוצע).

5. לחץ על Carbs (פחמיימות) להכנסת מספר פחמיימות מתאים.
לחץ על Done (בוצע).

6. לחץ על Notes (הערות) על מנת להזין הערות.
לחץ על Done (בוצע).

7. לחץ על Save (שמור) על מנת לשמר ולהחזיר למסך LOG EVENT (יומן אירועים). לחץ על Cancel (ביטול) על מנת לצאת מבלי לשומר את השינויים.

אינסולין



הזן את ייחדות האינסולין בהתאם בזמן ולסוג האינסולין.

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Insulin	Save
Time	Apr 12, 2022 14:15 >	
Units	2.0 >	
Type	Rapid-acting >	
Notes	>	

1. לחץ על **Event Log** (תפריט > יומן אירועים).
2. הוסף אירוע על ידי שימוש בסמל האירוע “+” < **Insulin** (אינסולין).
3. לחץ על **Time** (זמן) על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים.
לחץ על **Done** (בוצע).
4. לחץ על **Units** (יחידות) על מנת להזין את מספר היחידות המתאים.
לחץ על **Done** (בוצע).
- הערה: המספר המלא של ייחדות אינסולין שנייתן להזין הוא 2002.
5. לחץ על **Type** (סוג) על מנת להזין את סוג האינסולין המתאים.
לחץ על **Done** (בוצע).
6. לחץ על **Notes** (הערות) על מנת להזין הערות.
לחץ על **Done** (בוצע).
7. לחץ על **Save** (שמור) על מנת לשמר ולהחזיר למסך LOG EVENT (יומן אירועים). לחץ על **Cancel** (ביטול) על מנת לצאת מבלי לשומר את השינויים.

10

בריאות



הזין את סוג המצב הבריאותי, חומרה ואת התאריך והשעה.

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Health	Save
Time	Apr 12, 2022 14:16 >	
Severity	Medium >	
Condition	Fever >	
Notes	>	

10

1. לחץ על Log (תפריט < יומן אירועים).

2. הוסף אירוע על ידי שימוש בסמל האירוע “+” < Health (בריאות).

3. לחץ על Time (זמן) על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים.
לחץ על Done (בוצע).

4. לחץ על Severity (דרגת חומרה) על מנת להזין נמוכה, ביןונית או גבוהה.
לחץ על Done (בוצע).

5. לחץ על Condition (מחלה) על מנת להזין את המצב הבריאותי.
לחץ על Done (בוצע).

6. לחץ על Notes (הערות) על מנת להזין הערות.
לחץ על Done (בוצע).

7. לחץ על Save (שמור) על מנת לשמר ולהחזיר למסך LOG EVENT (יומן אירועים). לחץ על Cancel (ביטול) על מנת לצאת מבלי לשמר את השינויים.

פעילותות גופניות



הזמן סוג פעילות גופנית, משך ועכימות.

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Exercise	Save
Time	Apr 12, 2022 14:16 >	
Intensity	Medium >	
Duration	1hr 0min >	
Notes	>	

1. לחץ על Log (תפריט < יומן אירועים).

2. הוסף אירוע על ידי שימוש בסמל האירוע “+” (פעילות גופנית).

3. לחץ על Time (זמן) על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים.
לחץ על Done (בוצע).

4. לחץ על Intensity (עוצמות) כדי להזין Low (גמока), Medium (בינונית) או High (גבוהה).
לחץ על Done (בוצע).

5. לחץ על Duration (משך הזמן) על מנת להזין את המשך.
לחץ על Done (בוצע).

6. לחץ על Notes (הערות) על מנת להזין הערות.
לחץ על Done (בוצע).

7. לחץ על Save (שמור) על מנת לשמר ולהחזיר למסך LOG EVENT (יומן אירועים). לחץ על Cancel (ביטול) על מנת לצאת מבלי לשמר את השינויים.

10

11. דוחות

חלק זה מתאר את דוחות הסוכר השונים הזמינים ליצירת סיכום פרופיל הסוכר שלך. אתה יכול לבחור בתאריכים מסוימים או במרוחץ זמן אשר נקבע מראש.

סוגי דוחות

- סיכום מודלי שבועי.
- תרשימים עוגה עבור הסוכר.
- סטטיסטיות סוכר.

הערה: וודא שהתאריך והשעה על גבי המכשיר הנידיש לרן נכונים. דיווק הגרפים והדוחות תלוי בנכונות התאריך והשעה.

11

על מנת לראות דוחות רמות סוכר, לחץ על **Menu > Reports** (תפריט > דוחות) והחלק על מנת לעבור בין שלושה דוחות שונים. אתה יכול גם לשולח כל דוח בדוא"ל כקובץ pdf על ידי לחיצה על סמל הדוא"ל בפינה הימנית העליונה.

סיכום מודלי שבועי



דוח זה מראה את קריאות הסוכר שלך בשבועת הימים האחרונים, כאשר הם מסוכמים בתבנית גרפּ קו של 24 שעות על מנת לראות את המוגמות לאורך כל יום.


- **-קו הכהול** מסמן את ממוצע קריאות הסוכר שלך בשבוע האחרון בבלוק של שעה אחת.
- **-סרגלים האדומים** מראים את הקRIAה הנמוכה ביתר והקRIAה הגבוהה ביותר למעשה באותו בלוק של שעה אחת.
- **-הקוויים האדומים המקוווקווים האופקיים** מסמנים את רמות התחרעות שהגדרת עבור קריאת הסוכר הנמוכה והגובהה.
- **-קוויים היורקים המקוווקווים האופקיים** מסמנים את רמות היעד שהגדרת עבור קריאת הסוכר הנמוכה והגובהה.

דוח זה מספק גם סיכום סטטיסטי (ממוצע קריאות, סטית תקן של קריאות), ביצוע יעד הסוכר (אחוז בתוך, מעל ומתחת לרמות היעד של הסוכר) והערכים הגבוהים והנמוכים של קריאות הסוכר (אחוז קריאות שנכללו בטוויח רמות היעד הנמוך והגובה של הסוכר). המידע מוצג בהתאם על משובצות זמן של 6 שעות.

11

סטטיסטיקות סוכר


דוח זה מראה את קריאות הסוכר הנמכרות, הגבוקות וההמוציאעות, ביחס עם סטטיסטיקת התקן בתוך משਬצות זמן של 6 שעות. אתה יכול לבחור ביום האחרון, ב-7, 14, 14, 30 או 90 הימים האחרונים.

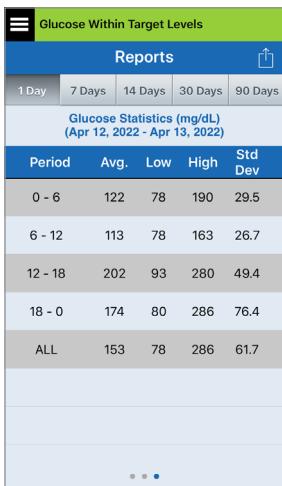


11

תרשים עוגה עבור הסוכר.

דוח זה מראה בפורמט גרפי איזה אחוז מן הקריאות שלך בתוך תקופה זמן קבועה, נמצאו מעל או מתחת לרמות היעד עבור קריאות הסוכר שלך. אתה יכול לבחור ביום האחרון, ב-7, 14, 14 או 90 הימים האחרונים.

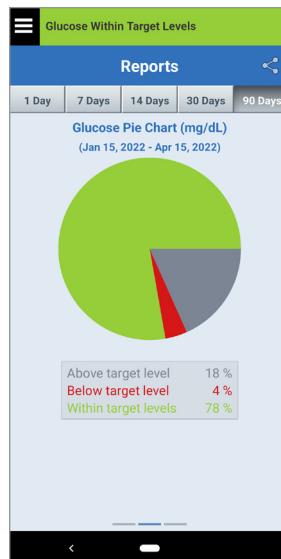

안드로이드

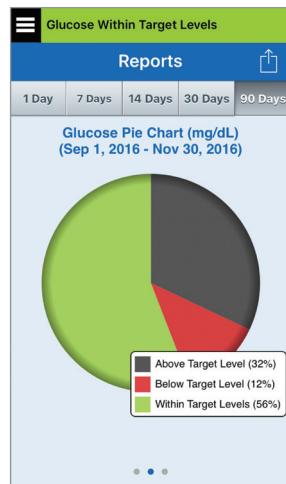

iOS

12. שיתוף נתונים

אתה יכול לשתוף נתונים בדרכים רבות עם *Eversense*.

תכנית (DMS) של Data Management Software (DMS)

תכנית DMS היא אפליקציה מבוססת אינטרנט המאפשרת למטופלים, למטפלים ולצוות הרפואי המכווני להציג ולנתוח את נתוני הסוכר השודרו מהմשדר החכם של Eversense E3 או אפליקציית מערכת Eversense CGM למכשירים ניידים.

תכנית זו מוצעת ללא תשלום עבור משתמשי מערכת Eversense E3 CGM. למידע נוסף על תכנית DMS של Eversense, עבור לכתובת <https://global.eversensediabetes.com>. כאשר אתה יוצר ורשות את החשבון שלך בעת ההתקנה של אפליקציית Eversense CGM, חשבון Eversense DMS נוצר עבורה באופן אוטומטי. במדריך המשמש עבור אפליקציית Eversense NOW ניתן למצוא מידע בנוגע לדרכ בה ניתן לראות נתוני סוכר מערכת E3 CGM מרוחק.

חשוב: המערכת לניהול הנתונים של E3 EVERSENSE אינה מספקת עצות רפואיות. שינויים בתכנית הטיפול שלך יבוצעו רק על ידי הצוות הרפואי שלך.

12

שתף את הנתונים שלי

מאפיין Share My Data (שתף את הנתונים שלי) באפליקציה לניד של מערכת Eversense CGM מאפשר לך לסנכרן באופן יידי את הנתונים שלך אל חשבון ה-Eversense DMS-Sharing שלך, להזמין חברים ובני משפחה לצפות מרוחק בנתוני ה-CGM שלך באמצעות האפליקציה לניד Eversense NOW ולהתחבר עם אפליקציות בריאות תואמות אחרות.


סנכרון



בכל זמן בו יש לך חיבור לאינטראנטו, פונקציית הסנכרון האוטומטי מופעלת ואותה נמצא באפליקציה, קרייאות הסוכר שלך מוסוכרכנות לחשבון-h DMS Eversense DMS שלך בערך כל 5 דקות. אתה יכול לנטרל את פונקציית הסנכרון האוטומטי.

על מנת לנטרל את פונקציית הסנכרון האוטומטי, לחץ על **Sync** (סנכרון) במסך **SHARE MY DATA** (שיתוף הנתונים שלי). העבר את לחץ **Auto Sync** (סנכרון אוטומטי) למסך כבוי.

על מנת לסנכרן את הנתונים שלך באפון ידני, לחץ על לחץ **START SYNC** (התחל סנכרון). נתונים עברו מספר הימים המוגדר כברירת מחדל יוסנכרנו. אתה יכול לקבוע כברירת מחדל עבור מספר ימי סנכרון יומ אחד, 3, 7, 14 או 30 ימים.

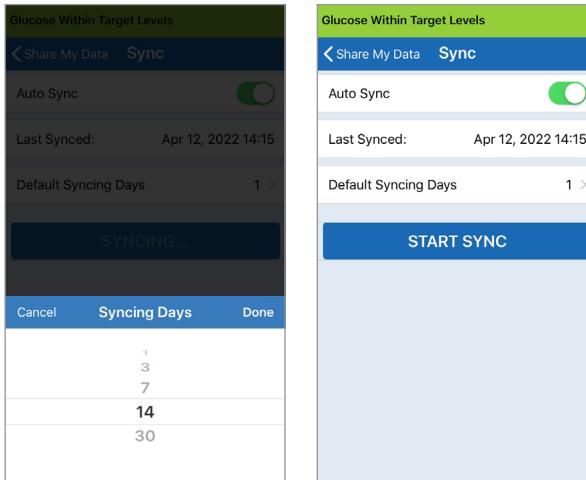


חשוב: אם אתה מנטרל את פונקציית הסנכרון האוטומטי, הנתונים שלך לא יישלחו לאף אחד על ידי שימוש באפליקציית NOW Eversense. מנת לנטר מרחוק את נתוני הסוכר שלך, והיסטורית נתוני הסוכר שלך לא תואחסן בחשבון-h DMS שלך.



הمعالג שלי



הمعالג שלי היא תכונה אופציונלית שמאפשרת להפעיל את הניטור מרוחק של נתוני Eversense CGM E3. למידע נוסף בנוגע למאפיין זה, ראה המمعالג שלי - ניטור מרוחק.


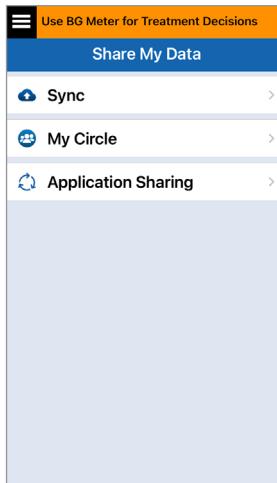


12

שיתוף אפליקציה



(שיתוף אפליקציה) הוא מאפיין אופציוני המאפשר לך לשיתף נתונים Eversense מסויימים עם אפליקציות בריאות תואמות אחרות. גע באפליקציה והפעל את **Data** (שיתוף נתונים). יכול להיות שגם יהיה צריך לאפשר שיתוף נתונים באפליקציית הבריאות.

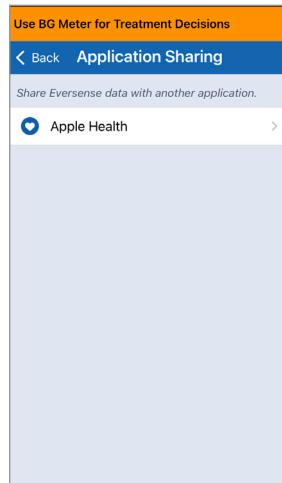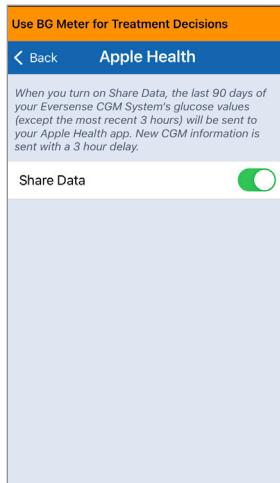

13. מידע מוצר ומיתר כללי בתוך האפליקציה

חלק זה מתאר את המידע הזמן בחלק ה-'אודות' של התפריט הראשי.

אתה יכול לראות מידע המסדר החכם שלך, החישון ואפליקציית Eversense CGM במכשיר הנידשך שלך.

במסך **My Sensor** (החינוך של'), אתה יכול למצוא את המספר הסידורי של החישון ונתונים אודות ההחדרה.

במסך **My Transmitter** (המכשיר של'), אתה יכול למצוא מידע הכלול את המספר הסידורי, מידע אודות כיויל ועוצמת הסוללה. אתה יכול גם להציג את מאפיין הרטט של המסדר החכם.

לlez על **Menu > About** (תפריט>אודות) ולאחר מכן **My Transmitter** (מכשיר של'), **My Sensor** (חינוך של') או **Product Information** (מידע על המוצר).

Glucose Within Target Levels	
>About	My Sensor
Linked SN	221984
Insertion Date	04/08/22
Insertion Time	15:59
Detected SN	221984

Glucose Within Target Levels	
About	My Transmitter
Device Information	▼
Calibration Information	▼
Demonstration	▼

≡	Glucose Within Target Levels
	About
	My Transmitter
	My Sensor
	My Account
	Product Information
	Contact Us
	Licence Agreement
	Privacy Statement
	Help

13



תמונה פרופיל

ניתן לעדכן את תמונה הпроfil שלך בחשבון Eversense או בחשבון Eversense DMS שלך, שתוצג באפליקציה Eversense או בחשבון Eversense DMS שלך.

- עברו אל **About > My Account** (אודות > החשבון שלי) ולחץ על התמונה. אתה גם יכול ללחוץ על התמונה מן התפריט הראשי.
- עקוב אחר הדרישה בצד לעדכן או למחוק את התמונה. אתה יכול לצלם תמונה חדשה או לבחור בתמונה קיימת המשמורה בתוך המיכסיר שלך.
- התמונה שתבחר תוצג במסך **Main Menu** (התפריט הראשי).

הערה: אתה יכול גם לשנות את תמונה הпроfil שלך מחשבון Eversense DMS שלך. ראה מדריך משתמש עבור Eversense DMS [למיידנו](#).

13

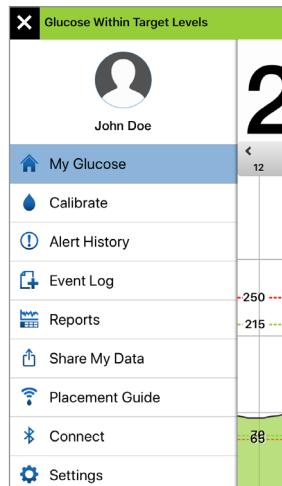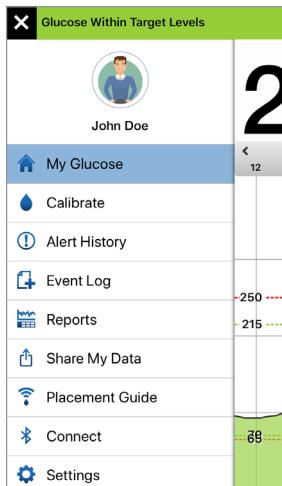

במסך **My Account** (החשבון שלך), אתה יכול לעורר את תמונה הпроfil שלך, לראות את תוכבת הדוא"ל ששימשה לצירוף חשבון Eversense שלך ויצאת מאפליקציית Eversense.



על מנת לקרווא את הסכם הרישוין עבור משתמש הקצה או את מדיניות הפרטיות, אנא בחר באופציה המתאימה.

The screenshot shows the 'About eversense' section and the 'END USER LICENSE AGREEMENT'. The main content area is titled 'Introduction' and discusses the company's mission to improve the lives of people with diabetes by enhancing their ability to manage the disease with relative ease and accuracy. It states that the products collect certain personal and health information and are committed to respecting privacy, protecting your data that we collect, and letting you decide how your information is used and shared. It includes a bulleted list of privacy practices and a note about the device being a combination of accuracy and long sensor life. At the bottom, it says 'These messages are not monitored 24/7. Do not use this email for urgent questions.'

על מנת למצוא את המפיין המקיים שלך באתר שלנו, לחץ על **Help** (עזרה).

אתה יכול גם למצוא משובים או לראות את הסכם הרישוין עבור משתמש הקצה או את מדיניות הפרטיות, אנא בחר באופציה המתאימה.

- לחץ על **Contact Us** (צור קשר) כדי לשוחח הודעת דוא"ל אל צוות שירות לקוחות המקיים שלך.

The screenshot shows an email window with the subject 'Message for Customer Support'. The body of the email states: 'These messages are not monitored 24/7. Do not use this email for urgent questions.' Below the message body, there is a 'Transmitter Details' section with the following information:
 Name: T0095502
 Serial Number: 0
 Model Number: 102204
 Firmware Version: 6.04.04W
 Last Cal: 04/12/22, 11:52
 Phase Start: 04/12/22, 12:07
 Completed Cals: 0
 Current Phase: 2 Daily Calibrations


חשוב: אנו לא מনטרים כתובת דוא"ל זו 24 שעות ביממה. נא לא להשתמש בכתבובת דוא"ל זו לעניינים בריאוטיים או נושאים דחופים.

PRODUCT INFORMATION
 במסמך **PRODUCT INFORMATION** (מידע על המוצר), אתה יכול למצוא מידע מידע אודות גרסה התכונה של האפליקציה ואודות **Senseonics, Inc**. היצורן של **Eversense E3 CGM** מערכת

The screenshot shows the 'Product Information' section for the 'Glucose Within Target Levels' product. It features the 'eversense' logo and the text 'Continuous Glucose Monitoring System'. The 'Company' section lists Senseonics, Inc., 20451 Seneca Meadows Parkway, Germantown, Maryland, USA, with the website global.eversensediabetes.com. The 'UDI / DI' section shows 00817491023544. The 'UDI / Version' section shows 7.1.2. The 'Released' section shows Jul 15, 2022. The 'Compatibility' section shows compatibility with <https://global.eversensediabetes.com/compatibility/>. A copyright notice at the bottom left reads '© 2022 Senseonics, Inc. Eversense Mobile Application (iOS)' and a CE mark with 'FG-5101-02-300' below it.

יציאה ממערכת

על מנת לצאת מחשבון Eversense שלך, לחץ על **My Account > Log Out** (החשבון שלי < יציאה).

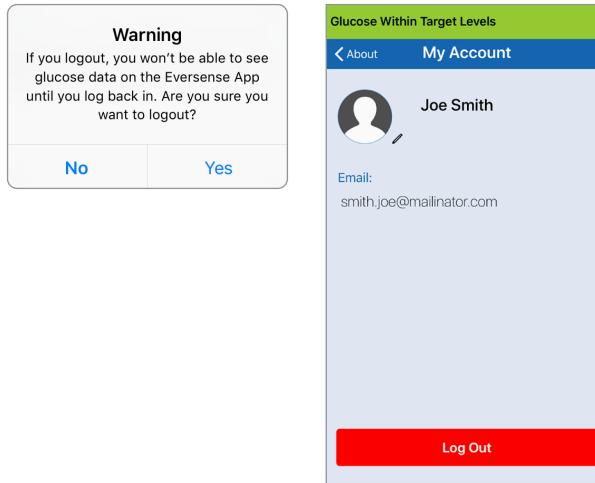

חשוב: אם תצא ממערכת, לא יציגו כל נתונים הוטוכר על ידי האפליקציה עד אשר תיכנס חזרה אל המערכת על ידי שימוש בכתובת הדוא"ל והססמה אותן הזנת כאשר הגדרת את החשבון שלך.

13

14. לראות נתונים Eversense E3 על גבי שעון ה-Apple

אתה יכול לראות מבט מהיר של נתונים Eversense E3 CGM שלך על גבי שעון ה-Apple. לאחר שהורדת והתקנת את האפליקציה Eversense CGM על גבי המכשיר הנייד שלך, עוקב אחר ההוראותüberו שעון ה-Apple על מנת להוציא את האפליקציה לשעון שלך.


שעון ה-Apple הוא תצוגה משנית של נתונים ה-Eversense E3 CGM ואין להשתמש בו כתחליף לתצוגה הראשונית של ה-Eversense E3 CGM.

כל בעיה עם המכשירים הניידים, האינטרנט האלחוטי, חיבור הנתונים, מערכת ניהול הנתונים של Eversense (DMS), אם המصدر החכם של משתמש ה-CGM נמצא מחוץ לטווח המכשיר הנייד שלו, או טעינה של המכשיר החכם, יכולים לגרום לאיתור בהערכת הנתונים או לא להציג את הנתונים בכלל.

אם בשלב כלשהו תיתקל בתסמינים של רמה נמוכה או גבואה של סוכר בدم או אם התסמינים שלך לא תואמים לקריאות הסוכר של החישון, עליך לבדוק את הסוכר עם מד סוכר בדם לפני שתתקבל החלטה טיפולית.

14

אתה יכול גם לגשת למסך **MY GLUCOSE** (הטוכר של) אם אתה מפעיל את ההודעות מן ה-**Eversense E3** בהגדרות שעון-ה-**Apple** שלך. כאשר אתה מקבל הודעה, אתה יכול גם ללחוץ על המסך על מנת לראות את מסך **MY GLUCOSE** (הטוכר של).

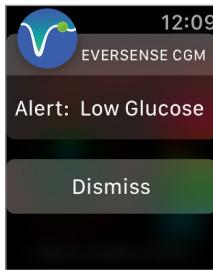

14


מסך **My Glucose** (הטוכר של) מראה את קריית הטוכר הנוכחית שלך עם חץ מגמה וגרף מגמות עבור נתוני-ה-CGM שלך במשך השלישיות האחרונות.




בכדי לגשת לתוכנות נוספות של האפליקציה, לחץ על סמל **HOME** במסך **Eversense** (בית) של השעון כדי לפתוח את האפליקציה.




החלק שמאלה למסך הבא שבו מופיעים נתונים הסוכר הנוכחיים שלך עם חץ מגמה, זמן היכיל הבא שלך, שלב היכיל המוכחי של המערכת ורמת הסוללה של המשדר החכם שלך.

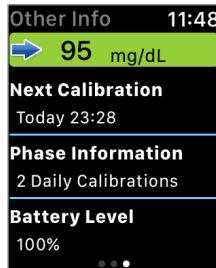

החלק למעלה על מנת לראות את אותם הנתונים המוצגים באחוזים.

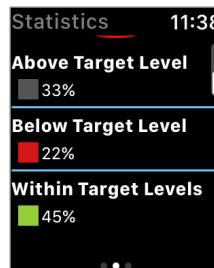

החלק שמאלה למסך הבא שבו מופיע תרשימים עוגה של משך הזמן הכלול בתוך טווח היעד ומהוצאה לו, במשך 24 שעות האחרונות.


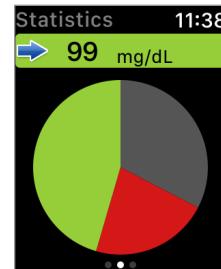


התראות והודעות המופיעות על גבי שעון Apple

שעון ה-Apple Watch הוא תצוגה משנית עבור האפליקציה CGM. את כל ההתראות או ההודעות המתקבלות על גבי שעון ה-Apple יש לאשר על גבי האפליקציה CGM לפני נקיית כל פעולה.

אם אתה מבטל התראה על גבי השעון, תציגת התראה תיעלם מסך הנעילה של הטלפון. לאחר פתיחת האפליקציה התראה תוצג ביחד עם כל המידע הקשור אליה.

הטבלה הבאה מציגה את ההתראות וההודעות אותן תוכל לקבל על גבי שעון ה-Apple מאפליקציית Eversense. חלק מן ההתראות וההודעות תשפיענה מהגדירות הצליל של האפליקציה ומופונקציית 'נא לא להפרע' באפליקציה. ראה *Alert Descriptions and Actions* (*הגדרות צליל ופעולות התראות*) (תיאור) למידע נוספת.

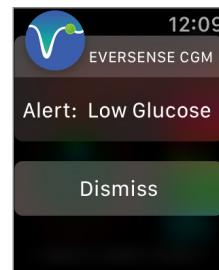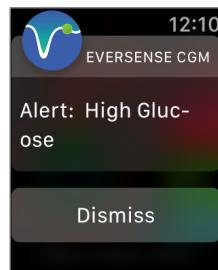

תצוגת שעון Apple

14

High Glucose (סוכר גבוה)

מופיעה בטווח הזמן אותו הזנת בהגדירות הצליל כאשר קרייאות הסוכר של החישון שלך שווה או מעל לרמת התראה עבור רמות סוכר גבוהות אחרות.

Low Glucose (סוכר נמוך)

מופיעה בטווח הזמן אותו הזנת בהגדירות הצליל כאשר קרייאות הסוכר של החישון שלך שווה או מתחת לרמת התראה עבור רמות סוכר נמוכות אחרות.

תיאור



פעול

Eversense CGM. שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמיינים ומוגמות. אם התסמיינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחישון, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בدم בעזרת דגימת דם מהאצבע לפניו כל החלטה בנוגע לטיפול.

אשר את הרהיטרעה באפליקציה **Eversense CGM**. שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמיינים ומוגמות. אם התסמיינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחישון, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפניו כל החלטה בנוגע לטיפול.

התreuות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התreuות

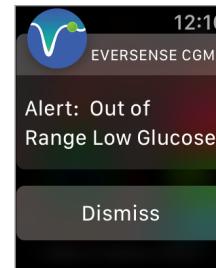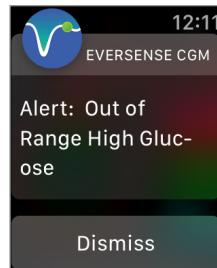

תצוגת שעון Apple

Out of Range High Glucose (סוכר גבוה מוחץ לטווח)

מופיעה כאשר רמת הסוכר שלך גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.
לא ניתן להציג קרייאות סוכר.

Out of Range Low Glucose (סוכר נמוך מוחץ לטווח)

מופיעה כאשר רמת הסוכר שלך נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל.
לא ניתן להציג קרייאות סוכר.

תיאור

אשר את ההתרעה באפליקציה CGM. בדוק את רמת הסוכר שלך באופן יומי על ידי שימוש במד סוכר בدم. אשר תמיד את רמות הסוכר שלך על ידי סוכר בדם לפני כל החלטת טיפול. כאשר ערך רמת הסוכר המגייע מן החישון יהיה 400 מ"ג/ד"ל או נמוך יותר, קרייאות הסוכר יוצגו שוב.



אשר את ההתרעה באפליקציה CGM. בדוק את רמת הסוכר שלך באופן יומי על ידי שימוש במד סוכר בדם. אשר תמיד את רמות הסוכר שלך על ידי סוכר בדם לפני כל החלטת טיפול. כאשר ערך רמת הסוכר המגייע מן החישון יהיה 40 מ"ג/ד"ל או גבוהה יותר, קרייאות הסוכר יוצגו שוב.

פעולות

14

התreuות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התreuות

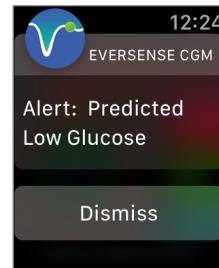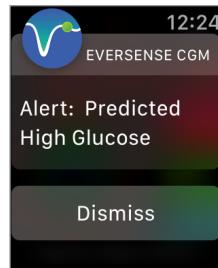

אזהרת שעון Apple

Predicted High Glucose (סוכר חזוי גבוה)

מופיעה מדי 60 דקות כאשר מגמת ערכו הסוכר נמצא בעלייה ותגיע לרמת ההתרעה על סוכר גבוה שהגדרת בתוך פרק הזמן שהזנתה בהגדרות.

Predicted Low Glucose (סוכר חזוי נמוך)

מופיעה מדי 60 דקות כאשר מגמת ערכו הסוכר נמצא בירידה ותגיע לרמת ההתרעה על סוכר נמוך שהגדרת בתוך פרק הזמן שהזנתה בהגדרות.

תיאור

14



Eversense אשר את ההתרעה באפליקציה CGM. שם לב לرمות הסוכר שלך, תסמיינים ומוגמות. אם התסמיינים אינם מתאימים לערך הסוכר בחו"ש, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בدم בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

אשר את ההתרעה באפליקציה CGM. שם לב לرمות הסוכר שלך, תסמיינים ומוגמות. אם התסמיינים אינם מתאימים לערך הסוכר בחו"ש, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

פעולה

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)



התראות

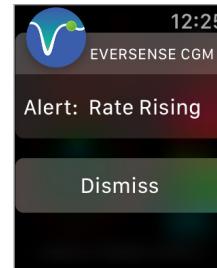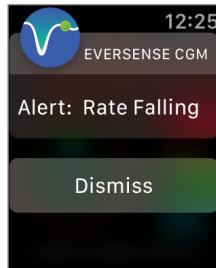

אזהרת שעון	תיאור	פעולה
	Rate Falling (קצב ירידה) מופיעה כל 60 דקות כאשר רמות הסוכר שלך נופלות בשיעור השווה או הגובה מקצב השינויו אותו הזנת בהגדרות.	Rate Rising (קצב עלייה) מופיעה כל 60 דקות כאשר רמות הסוכר שלך עולות בקצב השווה או הגובה מקצב השינויו אותו הזנת בהגדרות.
	Eversense CGM. שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמיינים ומוגמות. אם התסמיינים אינם מתאימים לערך הסוכר בחוישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בدم בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.	Eversense CGM. שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמיינים ומוגמות. אם התסמיינים אינם מתאימים לערך הסוכר בחוישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

14

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון Apple (המשר) התרעות

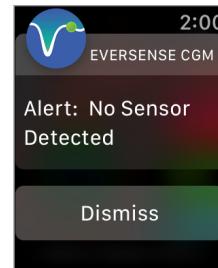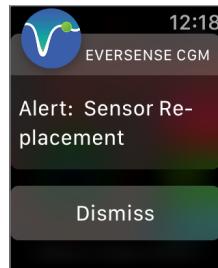

תצוגת שעון Apple

Sensor Replacement (החלפת חיישן)
מופיעה כאשר הבדיקות העצמיות של המערכת מأتירות שהחישן אינו מסוגל יותר לספק ערכיו סוכר.

No Sensor Detected (לא אותר חיישן)
מופיעה כאשר החיבור בין החישן שלך והմשדר אבד.
אין נתוני סוכר זמינים עד אשר מתבצע חיבור מחדש.

תיאור

14


אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת להחליף את החישן שלך.

אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. כאשר אתה עוזה שימוש במדריך המיקום לעיון, הנח את המשדר החכם מעל לחישן עד אשר ניתן לראותו שקיים חיבור.

פעולות

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)



התראות

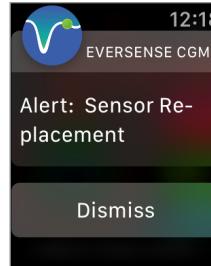אזהרת שעון	Apple
	
תיאור	פעולות
Charge Transmitter (טען את המשדר) מופיעה כאשר עוצמת סוללה המשדר החכם נמוכה מאוד ועליך לטען את הסוללה בהקדם.	Sensor Replacement (החלפת חיישן) מופיעה כאשר פג תוקפו של חיי החישן. לא ניתן להציג קרייאות סוכר עד להחלפת החישן.
Eversense CGM. הטען את המשדר החכם שller בהקדם האפשרי.	Eversense CGM. צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת להחליף את החישן שלך.

14

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התראות

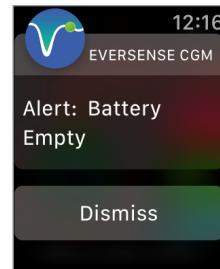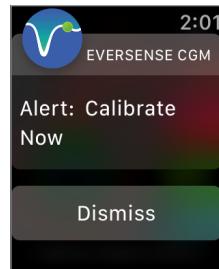

אזהרת שעון Apple

Calibrate Now (כיל עכשו)

מופיע על מנת להתריע לך שהגיע הזמן לכיו. אם אתה לא מבצע כיול תוך 4 שעות, לא ניתן יהיה להציג קריואות סוכר.

Battery Empty (סוללה ריקה)

מופיע פעם אחת כאשר סוללת המשדר החכם ריקה ויש לטען אותה. לא ניתן להציג קריואות סוכר עד אשר לא תבוצע טעינה של המשדר החכם.

תיאור

14


אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. לחץ על **Calibrate** (כיל) באפליקציה שלך בצד להזין ערך כיו.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הטען את המשדר החכם מיד. הסר את המשדר החכם מן הגוף שלך לפני חיבורו למקורה מותח.

פעולה

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)



התראות

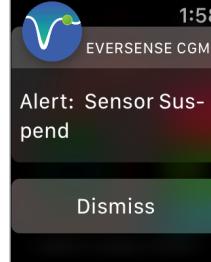אזהרת שעון	Apple
ת'יאור	ת'יאור
 <p>Calibration Past Due (איתור בכיוול)</p> <p>מופיעה כאשר המערכת מאטתרת ש עבר זמן הכיוול. לא ניתן להציג קרייאות סוכר עד אשר יזון ערך כיוול באפליקציה Eversense CGM.</p>	 <p>Sensor Suspend (השעיהת חישון)</p> <p>מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאטתרת צורך להתחילה מחדש את שלב האתחול עבור בדיקות כיוול נוספת. קרייאות רמות הסוכר תציגנה שוב כמה דקות לאחר ביצוע מוצלח של בדיקת הכיוול השנייה של שלב האתחול.</p>
<p>Eversense CGM. אשר את ההתרעה באפליקציה CGM. בצע בדיקת כיוול בעזרת דם מהאצבע על מנת להציג שוב את קרייאות הסוכר שלך.</p>	<p>Eversense CGM. אתחול מחדש של המערכת יחול בעוד 6 שעות.</p>

14

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התראות

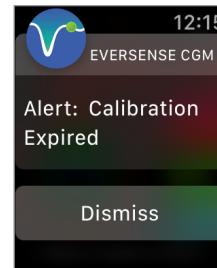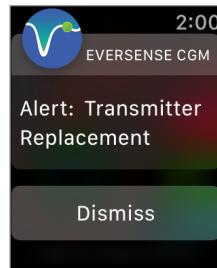

תצוגת שעון Apple

Transmitter End of Life 366 (סיום חיי המשדר יומם 366)

מופיעה כאשר המשדר שלו כבר היה בשימוש 365 ימים ואחריות המשדר שלו הסתיימה. לאחר 395 ימי שימוש, המשדר שלו לא יספק יותר קריאות סוכר.

Calibration Expired (פג תוקף הכילוי)

מופיעה כאשר לא הבצע כילוי במשך 24 שעות האחרונות. המערכת חוזרת לשלב האתחול.

לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר ייזן ערך כילו באפליקציה Eversense CGM.

תיאור

14


Eversense CGM. אשר את התראה באפליקציה CGM. צור קשר עם המפץ שלו על מנת להזמין משדר חדש.

אשר את התראה באפליקציה CGM. בשלב האתחול, עליך לבצע 4 בדיקות כילוי בעזרת דם מהאצבע במרוחחים של שעתים עד 12 שעות. קריאות רמות הסוכר תזגנה שוב לאחר ביצוע מוצלח של הכילוי השני בעזרת דם מהאצבע.

פעולות

התreuות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התreuות

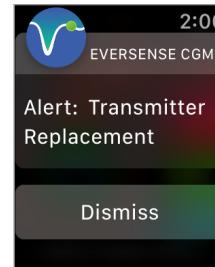

תצוגת שעון Apple

Transmitter End of Life 396

(סיום חי המשדר יום (396))

מופיעה כאשר נעשה שימוש במשדר שלך
במשך 396 ימים.

לא ניתן להציג קרייאות סוכר עד אשר תחליף
את המשדר שלך.

Transmitter End of Life 395

(סיום חי המשדר יום (395))

מופיעה לאחר שאחריות המשדר שלך הסתיימה
לפני יותר מ-30 ימים.

לא ניתן להציג קרייאות סוכר לאחר תאריך
התreuה זו עד אשר תחליף את המשדר שלך.

ת'יאור

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense

CGM. צור קשר עם המפץ שלך על מנת
להזמין משדר חדש.

אשר את ההתרעה באפליקציה CGM



צור קשר עם המפץ שלך על מנת
להזמין משדר חדש.

פעולות

14

התreuות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התreuות

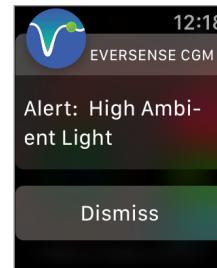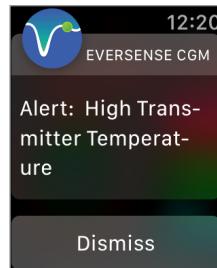


אזור שעון Apple

<p>14</p> <p>High Transmitter Temperature (טמפרטורה גבוהה של המשדר) מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של המשדר החכם חזרה מדי. לא מוצגות קרייאות סוכר עד אשר טמפרטורות המשדר החכם חוזרת ל佗וח טמפרטורות העולה הנורמלית.</p> <p>Eversense CGM. הפחתת טמפרטורת המשדר החכם על ידי הצעתו למקום קרים יותר. לאחר שהטמפרטורה של המשדר החכם תיגע אל מתחת ל-42 °C (108 °F), הוא יחזיר ויציג ערכי קרייאות סוכר. אתה יכול להסיר באופן זמני את המשדר החכם על מנת לקרר אותו. לאחר שטמפרטורת המשדר החכם ירדיה, הנהגנו שוב מעל לחישון.</p>	<p>High Ambient Light (תאורת סביבה חזקה) מופיעת כל 60 דקות כאשר החישון שלך מקבל יותר מדי תאורת סביבה, דבר המשפיע על יכולת שלו לתקשר עם המשדר החכם. לא ניתן להציג קרייאות סוכר עד להפחיתה עצמת תאורת הסביבה.</p> <p>Eversense CGM. הפחתת תאורת הסביבה בביבוצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:<ul style="list-style-type: none">• זו לאזור אשר פחות חשוף לאור.• הנה פיסת בעד כהה מעל למשדר החכם.• לבש את המשדר החכם מתחת לבגדים.</p>	<p>תיאור</p> <p>פעולות</p>
---	--	--



התreuות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

התreuות

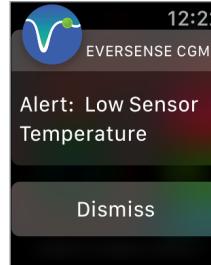התreuות	Alert: High Sensor Temperature	Alert: Low Sensor Temperature	אזהרת שעון Apple
High Sensor Temperature (טמפרטורת חיישן גבוהה) <p>מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של החישן גבוהה מ-°D.</p> <p>לא מוגנות קראיות סוכר עד אשר טמפרטורת החישן חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.</p>			תואר
Eversense CGM . עברו לסייע קרה יותר על מנת להפחית את טמפרטורת החישן שלך. הסר בזמן קצר את המשדר החכם שלך עד אשר טמפרטורת תימצא בטוויח (81 °C - 40 °F). רמותם על מנת להתחילה לקבל קראיות סוכר מינן החישן.	Low Sensor Temperature (טמפרטורת חיישן נמוכה) <p>מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של החישן נמוכה מ-°D.</p> <p>לא מוגנות קראיות סוכר עד אשר טמפרטורת החישן חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.</p>	פעולות	14

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התראות

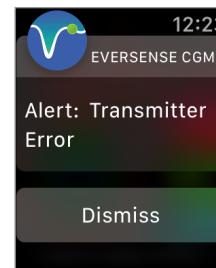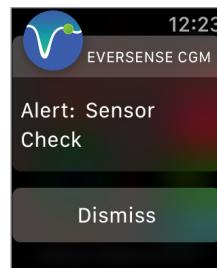

אזהרת שעון Apple

Sensor Check (בדיקה חישון)

מופיעה עם אחות כאשר הבדיקות הפנימיות של המערכת מצהות חוסר יציבות של החישון שמחיבת חזרה לשלב אתחול הכיוול.

Smart Transmitter Error (שגיאת משדר חכם)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת שגיאת משדר החכם.
לא מוצגות קיריאות סוכר עד שהשגיאה תתוקן.

תיאור

14



אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. בשלב האתחול, עליך לבצע 4 בדיקות כיוול בעזרת דם מהאכבע ברמות גבוהים של שעתיים עד 12 שעות. קריאות רמות הסוכר תציגושוב לאחר ביצוע מוצלח של הכיוול השני בעזרת דם מהאכבע.

אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. עקב אחר הצעדים המוצגים בחלק אייתור וטיפול בבעיות על מנת לאותל את המשדר החכם שלך. אם אין מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר עם שירות לקוחות.

פעולה

התreuות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התreuות

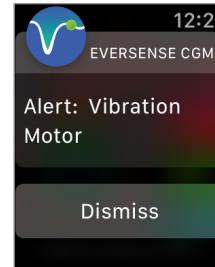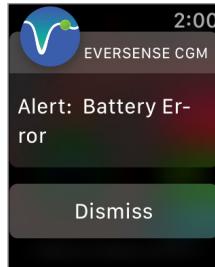

אזהרת שעון Apple

שגיאת סוללה (Battery Error)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאמתת שגיאת סוללה במשדר החכם שלך. קרייאות הסוכר תהינה מוצגות אבל יהיה צורך להחליף את המשדר החכם שלך.

מנוע רטט (Vibration Motor)

מופיעה כל 60 דקות כאשר מניע הרטט על גבי המשדר החכם שלך לא יכול לספוק יותר התreuות רטט על הגוף. אתה תנסה לקבל קרייאות רמות סוכר עד לכ-72 דקות לאחר קבלת המסר. לאחר 72 דקות, אתה תקבל התreuת שגיאת משדר חכם כל 20 דקות עד אשר תחליף את המשדר החכם.

תאזר

14



אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. צור קשר עם המפיז שלך על מנת להזמין משדר חדש.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. צור קשר עם שירות הלוקוחות על מנת להחליף מיד את המשדר החכם שלך.

פעולות

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

התראות

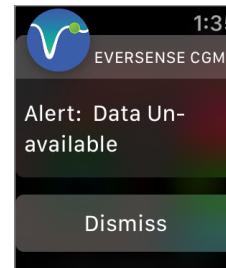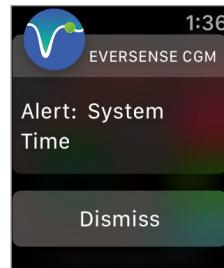

אזהרת שעון Apple

System Time Error (שגיאת זמן מערכת)

מופיעה כאשר המערכת שלך מאטירת א' התאמה בין שעון המכשיר הנייד שלך ושעון המערכת.

Data Unavailable (נתונים לא זמינים)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאטירת שגיאת מערכת.
לא מוצגות קרייאות סוכר עד שהשגיאה תזוקן.

תיאור

14



אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. הגדר את שעון המכשיר הנייד שלך אל הזמן המקומי. אם הנושא ממשיר, צור קשר עם שירות הלקוחות.

אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. חבר את עריסת הטעינה באמצעות כבל אל שקע קיר או יציאת USB. הנח את המשדר החכם בתוך העריסה והסר אותו. אם הבעה ממשיכה, עקוב אחר הצעדים המוצגים בחלקアイテור וטיפול בבעיה על מנת לאתחל את המשדר החכם שלך. אם אין מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר עם שירות

פעולות

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר)

התראות

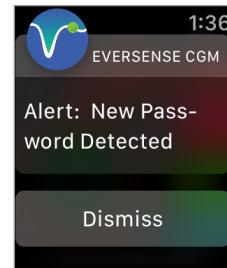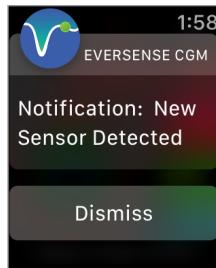

אזהרת שעון	Apple
------------	-------

New Sensor Detected (זיהוי חיישן חדש)

מופיעה כאשר המשדר החכם מאתר חיישן חדש. יש לקשר בין החישין והמשדר החכם על מנת להתחליל בתקשורת.

New Password Detected (זיהות ססמה חדשה)

מופיעה כאשר המערכת מאתרת שינוי של ססמה באמצעות חשבון ה-Apple DMS בלבד.

Eversense CGM. אשר את ההתרעה באפליקציה **Link Sensor** (קשר חיישן) על מנת להשלים את תהליך הקישור ולהתחליל את תקופת החימום הנמשכת 24 שעות. אין צורך לשאת את המשדר החכם בלבד מעל לחישין עד לסיום של תקופת החימום.

Eversense CGM. צא מן האפליקציה וכנס אליה חזרה עם הססמה החדשה.



תיאור

פעולה

14

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

הודעות

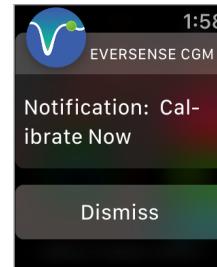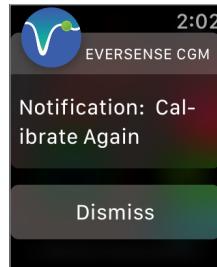

אזור שעון Apple

Calibrate Again (כיל שוב)

מופיעה כאשר לא נאספו נתונים מספיקים במהלך הכיל.

Calibrate Now (כיל עכשיו)

מופיעה כאשר הגע הזמן לכיל כאשר המערכת נמצאת בשלב האתחול או לאחר שהוזן ערך כיל אשר מאד שונה מערך הסוכר בჩישון.

תיאור


14

אשר את ההתרעה באפליקציה CGM. לחץ על Calibrate (כיל) באפליקציה CGM. לאחר מכן ערכו כיל חדש.

אשר את ההתרעה באפליקציה CGM. בצע בדיקת רמת סוכר בעזרת דם מהאצבע והזין את הקיראה ערך הכיל שלך. אל תשתמש בקריאת דגימה ממוקם אחר (כגון אמת היד) לקבלת קריאות הסוכר בדם שלך.



פעולה

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר) Notifications (הודעות)

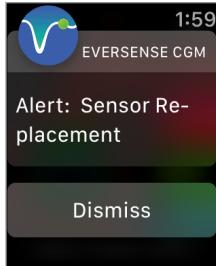
אזהרת שעון Apple	תגובה שעון Apple
 <p>Sensor Replacement モピעה 60, 30, 14, 7, 3 ויום אחד לפחות סיום תקופת הנשיאה של החישון שלך כתזורת שאתה צריך להחליף את החישון שלך.</p>	 <p>New Calibration Needed (יש צורך בכיוול חדש) モピעה כאשר ערך הניווט שהזנת שוניה באופן מאוד מעריך רמת הסוכר שלך שאותרה על ידי החינוך. לאחר 60 דקות, אתה מקבל הודעה כיל עכשו.</p>
<p>Eversense CGM. צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת קבוע תור להסרת החישון והחלפתו.</p>	<p>Eversense CGM. הzin ערך כיוול חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.</p>

14

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון Apple (המשר) Notifications

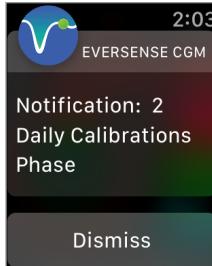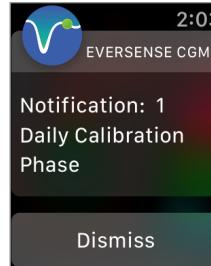14	Asher et hahtera'ah ba-applikatsiya CGM. Hazon urak tsyol chadash casher tatbekash le-eshot zat.	Asher et hahtera'ah ba-applikatsiya CGM. Hazon urak tsyol chadash casher tatbekash le-eshot zat.	תיאור	tzavaot shuvon apple (הודעות)
	 <p>Notification: 2 Daily Calibrations Phase</p> <p>Dismiss</p>	 <p>Notification: 1 Daily Calibration Phase</p> <p>Dismiss</p>		

התראות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשר) (הודעות Notifications)

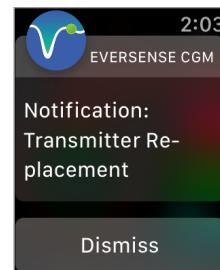

תצוגת שעון Apple

**Transmitter End of Life Day 330
(סיום חי המשדר יומ 330)**
מופיעה פעם אחת 35 ימים לפני סיום אחריות המשדר.

תינוק

אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. צור קשר עם המפץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.

פעולות

14

15. המعالן של

ניטור מרוחק באמצעות מערכת Eversense E3 CGM ואפליקציית Eversense NOW

אפליקציה אפליקציית Eversense CGM כוללת מאפיין אופציוני של ניטור מרוחק. אפליקציית Eversense CGM מתקשרת עם אפליקציית NOW Eversense לńיטור מרוחק על מנת לאפשר לאנשים אחרים לראות את הנתונים שלך.

סיכום

ייתכן ותהיינה פעמים בהן נתוני הסוכר שלך שיישלחו לאפליקציית NOW Eversense. אם חבר בمعالן שלך קיבל נתונים ממערכת E3 CGM Eversense, הוא לא יוכל לעזור לך במקרים של רמות סוכר גבוהות או נמוכות. התצוגה המשנית וההודעות על גבי אפליקציית NOW Eversense אין מחליפות את התצוגה הראשונית של אפליקציית מערכת CGM Eversense שלך.

ייתכן ולחברים בمعالן שלך לא יהיה תמיד חיבור על מנת לתמוך בהעברת נתונים כגון חיבור אינטרנט/אינטרנט אלחוטי או 3G/4G/LTE. אם לחבר מן המمعالן שלך אין חיבור לאינטרנט, נתונים הסוכר שלך לא יהיו זמינים על גבי התצוגה המשנית. כל בעיה עם המכשירים הנידים, האינטראקט האלחוטי, חיבורו הנתונים, מערכת ניהול הנתונים של Eversense (DMS), אם המשדר החכם נמצא מחוץ לטוויה המכשיר הנידי שלו, או טעינה של המכשיר החכם, יכולים לגרום לנ נתונים שלך לא להיות מוצגים לחבר הمعالן שלך. אתה לא צריך להסתמך על אנשים המנתרים מרחוק את נתונים הסוכר שלך במקרים של קריאות סוכר נמוכות או גבוהות.

מאפיין הניטור מרוחק מספק תצוגה משנית של הודעות נתונים לאלו הנמצאים בمعالן שלך. זהה אינה מערכת ניטור מרוחק בזמן אמת.

הטבות

מערכת E3 CGM שנמצאת בשימוש עם אפליקציית ה-NOW Eversense לניטור מרוחק יכולה לשפר למשתמשי ה-CGM ביחסון נוסף, כאשר הם מודעים לעובדה שאחרים יכולים גם לראות את נתונים ה-CGM שלהם.

אחרות

- אין להשתמש בנתוני סוכר המוצגים על גבי אפליקציית Eversense NOW על מנת לבצע החלטות טיפול. השתמשת תמיד בערכיו קריאות הסוכר בدم על מנת לבצע החלטות טיפול. שימוש בערך סוכר של החישון לקבלת החלטה לגבי טיפול עשוי לגרום לרמת סוכר בדם גבוהה או נמוכה בדם. נתוני אפליקציית Eversense NOW מהווים תצוגה משנית של נתוני CGM Eversense E3 CGM ואין להשתמש בהם במקרים התצוגה הראשונית של Eversense E3 CGM.
- אתה לא צריך להסתמך על אנשים המנטרים מרוחק את נתוני הסוכר שלך במקרים של קריאות סוכר נמוכות או גבוהות.

אמצעי זהירות

- האפליקציה למכשיר נייד NOW איננה מחליפה את משטר הניטור אשר ניתן לשירות על ידי הצוות הרפואי שלך.
- אם פונקציית הסנכרון האוטומטי (המאפיין המאפשר שליחות נתונים אוטומטית לאפליקציה NOW Eversense שלך) אינה מופעלת, אתה לא תוכל לשתחן נתונים עם חברי המעגל שלך והם לא יראו מגמות או אירועים של רמות סוכר נמוכות או גבוהות.
- אם לך או לחבריך המעגל שלך אין חיבור לאינטרנט, או אם המכשיר הניד כובה בשל מחת סוללה נמוך או סוללה ריקה, נתונים Eversense E3 CGM שלך לא יוצגו על גבי אפליקציית NOW.
- אם חברי המעגל שלך מכבים את הצללים במכשירים הנידים שלהם, הם לא יכולים לשמעו התרעות ציליל בגין נתונים CGM שלך על גבי אפליקציית NOW Eversense שלהם.
- אם תגדר את הסטוסים שלך לאוף-ליין עם כל אחד מן החברים בمعالך שלך, הם לא יקבלו את נתונים CGM שלך על גבי אפליקציית NOW Eversense שלהם. אל תגדר את הסטוס שלך לאוף-ליין אם אתה רוצה שחברים בمعالך יקבלו את נתונים CGM שלהם.
- אפליקציית NOW Eversense איננה מתחברת באופן ישיר עם CGM שלך עם המשדר החכם ו/או עם המשדר החכם שלך.
- אפליקציית NOW Eversense לא יכולה לשנות את ההגדרות של אפליקציית CGM Eversense שלך.


אמצעי זהירות (המשך)

- אם משתמש NOW Eversense איננו מאפשר הודעות אפליקטיביות NOW, הוא לא יקבל התרעות סוכר ממן.
- אם המכשיר הנייד שלו נמצא במצב 'נא לא להפריע', אתה לא תוכל לשמעו הודעות המגיעה מapplikativit NOW Eversense.

דרך מסך **MY CIRCLE** (המעגל שלו) באפליקציה Eversense XL במכשיר הנייד שלך, אתה יכול להזמין עד חמישה אנשים על מנת לראות את הנתונים שלך. כאשר אתה מזמן משיחו להציגך אל המנגנון שלך, ההזדמנות תישלח באמצעות כתובת הדוא"ל אותה הזנת. לאחר שהחומרה התקבלה ומתחבצת הורדה של אפליקטיבית NOW, חברים במעגל שלך יכולים לראות את נתוני הסוכר האחרונים שלך, אירועים והתרעות.

חשוב: חברים במעגל שלך להם אין את אפליקטיבית NOW לא יוכל לראות את הנתונים שלך.

בכל זמן בו לאפליקטיבית מערכת CGM של Eversense NOW ואפליקטיבית NOW יש חיבור לאינטרנטן, מתבצע סונכרון של נתונים הסוכר שלך אל אפליקטיבית NOW בערך כל 5 דקות. סונכרון של נתונים יכול להתבצע לפחות יותר באפליקטיבית NOW.

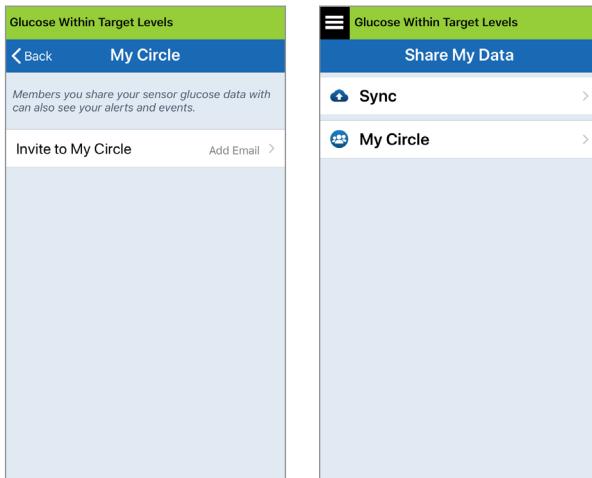


עזרה: אם נטרלת את אפשרות הסונכרון האוטומטי, נתונים הסוכר שלך לא יהיו זמינים באפליקטיבית NOW לניהור מרוחק.



1. מן התפריט הראשי, לחץ על **Share My Data > My Circle** (שתקט את הנתונים שלו < המנגנון שלו) על מנת להציג את מסך **MY CIRCLE** (המעגל שלו).

2. על מנת להזמין חבר חדש לראות את נתונים הסוכר שלך, לחץ על **Invite to My Circle** (הזמן למעגל שלו).

4. מופיע מסך בו רואים שהזמן נשלחה. לחץ על OK (אישור).

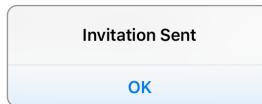


לאחר שהזמן התקבלה, שם החבר יופיע ברשימת החברים על גבי מסך **MY CIRCLE** (המעגל שלו) באפקציה שלו.

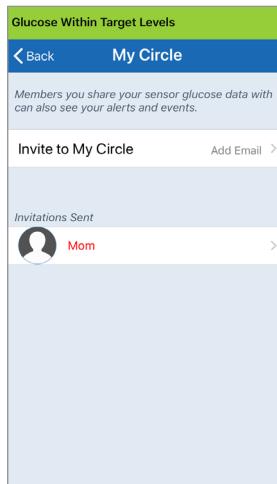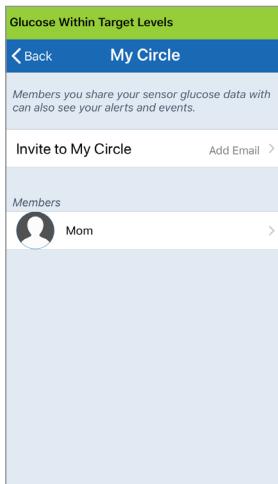

הערה: תמונות פרופיל עבור אלו המנטרים מרוחק את רמות הסוכר שלו נקבעים בחשבון-hDMS על ידי בעל החשבון. אתה לא יכול לשנות את תמונות הפרופיל עבור האנשים אותם הזמנת אל המعال שלו.

3. הzin את כתובות הדוא"ל של האדם אותו אתה רוצה להזמין אל המعال שלו, ולאחר מכן לחץ על Send (שליחה) לאחר ההשלמה.

הערה: אתה יכול ללחוץ על ה- "+" ליד שדה כתובות הדוא"ל על מנת לבחור כתובות הדוא"ל מראשית אנשי הקשר שלו.



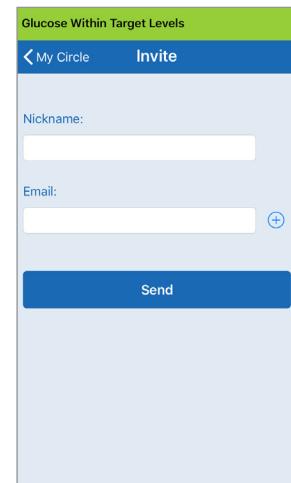


15

ឧצה: כינויים הם אופציונליים, וניתן להשתמש בהם על מנת לנחל בקלות את חברי המعال שלו. אם אתה בוחר לא להעניק כינוי לחבר מן המعال שלו, כתובות הדוא"ל שלו תוצג במקום הכינוי.

הסר חבר מן המUGCל שלו


2. לחץ על Remove (הסירה) על מנת להסיר חבר מן המUGCל שלו. לחץ על Yes (כן) כאשר תתבקש לעשות זאת.

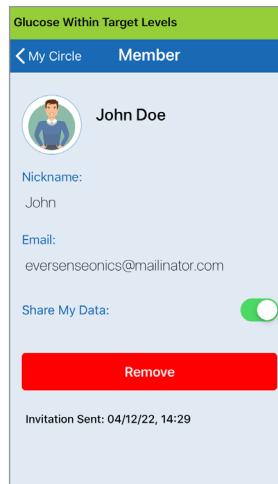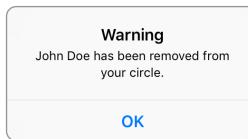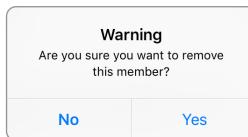

15

החבר אותו הסרת יקבל הודעה על גבי אפליקציית Eversense NOW שלו אם הוא כבר קיבל את הזמנה.


1. על מנת להסיר חבר או הזמנה, לחץ על שם החבר בראשימת החברים או בראשימת הזמנות שנשלחו במסך MY CIRCLE (הUGCל שלו).

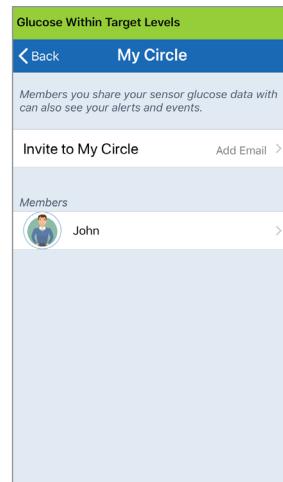


הפסקה זמנית של שיתוף הנתונים

"יתכן ותהיה תקופות בהן תרצה להפסיק באופן זמני את שיתוף הנתונים שלך עם חבר מסוים, אך לא תרצה להסיר אותו מן המעגל שלך.

2. לחץ על לחצן **Share My Data** (שיתוף הנתונים שלי) על מנת להפעיל/לכבות שיתוף נתונים עם חבר זה.

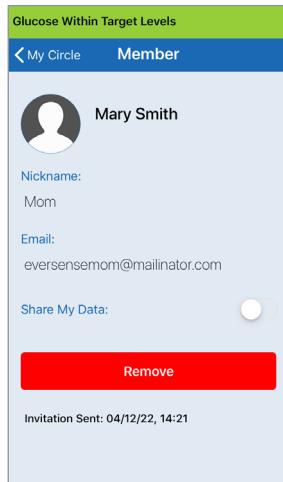

1. לחץ על שם החבר ברשימת המעגל שלו על מנת לפתוח את מסך **MEMBER** (חבר).

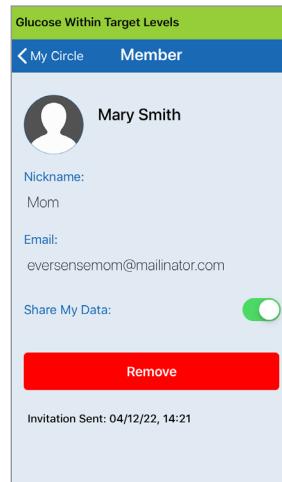

חשיבות: אם נטרלת את מאפיין שתף את הנתונים שלי עבור חבר מסוים, חבר זה לא יוכל לראות נתונים סודיים ממערכת Eversense E3 CGM שלך, התנועות או היסטוריית אירועים. החברים יראו את הסטטוס שלך כאפ-ליין באפליקציית Eversense NOW שלהם כאשר נטרלת את מאפיין שתף את הנתונים שלך. "יתכן שיחלו עד 10 דקות עד שהשינוי יוצג באפליקציה של משתמש NOW ONLY".


הערה: משתמש NOW יכול גם להסיר אותך מן האפליקציה שלך. "יתכן שייקח שעתיים עד ששינויים אלה יוצגו באפליקציית CGM Eversense שלך.

למידיע נוספת אפליקציית App Eversense NOW, אני צריך קשר עם המפתח המקומי שלו.

15

16. אודות החישן

חלק זה מתאר את חישן Eversense E3 וכיוד הוא מוחדר על ידי הצעות הרפואיות שלך.

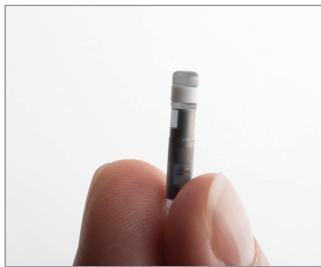

חישן E3

חישן E3 הוא פלאורומטר ממוצע המשמש בעוצמת פלאורסתנט כדי למדוד סוכר בNAL הבין-תאי. החישן מושתל באופן תת-עור (מתחת לעור) בחלק העליון של הזרוע, כאשר אף חלק של החישן אינו בולט מחוץ לעור. החישן נשאר במקומו ומספק נתונים CGM (nitror סוכר רציף) במהלך תקופה של 180 ימים.

החישן ארוץ בחומר בעל תאיות ביולוגיות והוא משתמש בפולימר פלאורסתנטי ייחודי המראה את רמת הסוכר. דיזודה פולטת אוור המורכבת בתוך החישן מגירה את הפולימר ולאחר מכן הפולימר מאotta לגביו שינויים בריצוף הסוכר דרך שינוי בפלט האור. המדידה נשלחת לאחר מכן אל המשדר החכם. המדידות מושלמות באופן אוטומטי ואין דרישות כל פעולה מצד המשתמש.

מידות החישן הן בערך 3.5 מ"מ על 18.3 מ"מ ויש לו טבעת סיליקון המכילה כמות קטנה של דקסומתזון אצטט, תרופה סטרואידית אנייד-דלקתית. חומר הדקסומתזון אצטט מפחית את התגובה הדלקתית, בדומה להתקנים רפואיים אחרים, כגון קוזבי לב.

שלבי החדרה

ה策ות הרפואי שלך יסביר לך ויבצע את השלבים הקלים והמהירים על מנת להחדיר את החישן. אתה תהיה עד למרי במהלך כל הליך ההחדרה האורכ- 5 דקות.

מיקום ההחדרה:

חשוב מאוד לבחור במקום על גבי הזרוע העליון בו יהיה לך נוח להחדיר את החישן ולשאת את המשדר החכם לתקופה של עד 180 ימים. מומלץ להחדיר את החישן לעבר החלק האחורי של הזרען של הזרוע שולך. מיקום במקומות זה מפחית את הסיכון שהחישן או המשדר החכם יתקלו בדלקות, קירות או מעברים צרים. אם ניתן, יש להימנע מאזורים עם עור רפואי, צלקות, קעקועים, שומות או כל דם שעלולים להיחתר במהלך הפרוצדורה. בהchodרות חוזרות מומלץ להחליף את מיקום ההחדרה לזרוע השנייה.

שלב 1: הכנת המקום – מיקום ההחדרה יונקה, יחותא וירודם בעזרת ליזוקאין.

שלב 2: חתך קטן (של פחות מסנטימטר) יבוצע במקומות ההחדרה.

שלב 3: החדרת החישן – כיס תחת עורו יוצר מתחת לעור והחישן יוחדר אל כיס זה.

שלב 4: סגירת אטר – החתך יסגר באמצעות תחבושת נדבקת. בדרך כלל נעשה שימוש ב-TM Steri Strips בצדדי לסגור את החתך.

שלב 5: קישור החישן אל המשדר החכם – קשר בין החישן למשדר החכם כדי להתחיל בשלב החיבור ב- 24 שעות לפני הנחה של המשדר החכם.

הערה: לאחר ההחדרה, קשר בין החישן אל המשדר החכם ולאחר מכן אפשר למקום ההחדרה להירפאה 24 שעות לפני הנחה של המשדר החכם.

לאחר 24 שעות להתייצב בתוך מקום ההחדרה, תקופה זו ידועה כתקופת החימום. לאחר 24 שעות ממועד ההחדרה, מוקם והצמד את המשדר החכם מעל החישן כדי להבטיח שיש חיבור ביניהם (ראה הנחה ינית של המשדר). לאחר מכן תוכל לבצע את ציול השלב הראשון של 4 בדיקות סוכר בדם באמצעות דגימת דם מהאצבע כדי להתחיל לקבל קריאות סוכר.

16

שלבי הסרת

בדומה לשלב החרדרה, הוצאות הרפואיות יסביר את השלבים המהירים והפשוטים להסרת החישן, ותהייה ערך לחילוטין במהלך תהליך ההסרה בן 5 הבדיקות (בערך).

שלב 1: הכנות המקום – האטר שבו יוחדר החישן ינוקה, יחותא וירדם באמצעות לידוקאיין.

שלב 2: חתך – חתך קטן (של פחות מ-1 ס"מ) יבוצע באתר החישן.

שלב 3: הסרת החישן – החישן יוסר ויזרק.

שלב 4: סגירת המקום – לאחר ההסרה, החתך יסגר עם תחבושת™ SteriStrips (ניתן יהיה להשתמש בתפרים בהתאם להעדפת הוצאות הרפואיות).

17. נסיעות

חלק זה מתאר את נושאי הבטיחות בעת נסיעה עם המשדר החכם והחישון Eversense E3 השיכים לך.

בעת נסעה, ניתן לעبور בנקודות הביקורת בשדות התעופה עם המשדר החכם והחישון שלך. אתה יכול להודיע על קצין הבטיחות שיש לך התקן רפואי מושתל.

המשדר החכם שלך יבצע סנכרון אוטומטי לתאריך והשעה הנוכחים של הטלפון החכם שלך, כאשר מתבצע שינוי שלאזור זמן.

מערכת Eversense E3 CGM בטוחה לשימוש בכל קווי הטיסה המוסחריים בתוך ארה"ב. המשדר החכם E3 הוא התקן רפואי נישא (M-PED) עם רמות פליטה העומדות בתקני ה-FAA לשימוש בכל המוצבים במהלך טיסתך. (לעיוון בהמלצות ה-FAA, חוצר מס' 21-16G, מתאריך ה-22 ביוני 2011). לשימוש הפעיל את מאפיין Bluetooth לאחר שהעברת את המכשיר הנייד שלך למצב טיסתך. עברו טיסות מחוץ לאלה"ב, עקב אחר תקנות הבטיחות המקומיות בנוגע לשימוש בהתקנים רפואיים במהלך טיסתך.

18. איתור וטיפול בבעיות

חלק זה כולל מידע בנוגע לאיתור וטיפול בעיות עבור מערכת CGM שלך וככל רשותה של *Eversense E3 CGM*.

2. השתמש במסך **PLACEMENT GUIDE** (מדריך מיקום) על גבי האפליקציה על מנת לאשר את החיבור בין החישון והմשדר.
- לחץ על **Placement Guide** (מדריך מיקום).
 - מקם את המשדר החכם מעל לחישון כרך שיטקבל אישור של החיבור.

הערה: למידע נוסף אודוט חזק האות והעמדת המשדר, ראה **מדריך מיקום – מסך פרטיים נוספים** בחלק **קיישור החישון**.

ש: המשדר החכם שלי אינו רוטט. מדוע?

ת: אם המשדר החכם אינו רוטט, נסה את הצעדים הבאים:

- וודא שהמשדר החכם מקשר אל המכשיר הנייד שלך.

- Do Not Disturb**
(נא לא להפריע) מנוטרל על ידי לחיצה **Menu > Sound > Settings** על **Settings** (תפריט > הגדרות > הגדרות צליל).

משדר חכם

ש: איך אני מכבה את המשדר החכם שלי?
ת: לחוץ והחזק את לחוץ הפעלה של המשדר החכם למשך 5 שניות. שחרר את הלחוץ כאשר המשדר החכם מתחילה לרוטט.

ש: איך אני מפעיל את המשדר החכם שלי?
ת: לחוץ והחזק את לחוץ הפעלה של המשדר החכם למשך 5 שניות. שחרר את הלחוץ כאשר המשדר החכם מתחילה לרוטט.

ש: איך אני ממקם כהלה את המשדר החכם שלי מעל לחישון?

ת: יישן שתי דרכי להבטיח מיקום מתאים:
1. בעת השימוש במכשיר על מנת להחזיק את המשדר החכם במקומו, וודא שסימן לחוץ הפעלה ונורית החיווי מושרים במקביל לזרוע שלך.

- ש: כמה נוריות החיווי על גבי המשדר החכם שלו?**
דולקנת באור כתום מתממשר?
- ת: עוקוב אחר הצעדים למטה על מנת לטפל במשדר החכם:

 1. וודא שהמשדר החכם מחובר אל המכשיר הנידי.
 2. וודא שהמשדר החכם טען.
 3. בדוק אם יש התרעות או הודעות באפליקציה שלך.
 4. הסר את המשדר החכם מן הזרוע שלך והמתן כמה דקנות. מסר **No Sensor Detected** (לא זווהה חישון) יופיע והמשדר החכם אמור לרוטט זווהה חישון). בתקידות גבוהה יותר ככל שהוא מחשש חישון.
 - אם המשדר החכם אינו רוטט או שהאפליקציה קציה **No Sensor Detected** איןנה מצגתה מסר (לא זווהה חישון), צור קשר עם שירות הלקוחות בארה"ב. מחוץ לארה"ב, צור קשר עם המפיצ' המקומי שלך. הנה שוב את המשדר החכם מעל לחישון לראות עם נוריות החיווי הכתומה נכנית והוא קשוב להודעות על גבי האפליקציה.
 - אם נורית החיווי הכתומה עדין ממשיכה לדלקון, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות.

• וודא שהמשדר החכם שלך יש מספיק מתח בסוללה והטען אותו אם יש צורך בכך.
אם המשדר החכם עדין אינו רוטט, צור קשר עם שירות הלקוחות או המפיצ' המקומי שלו לפתרונות נוספים.

ש: האם אני יכול להסיר ולהניח מחדש מסטר את אותה המדבקה מספר פעמים ביום?
ת: הסרה והנחה מחדש החוזרות על עצמן עלולות להפחית את חזק ההדבקה.

ש: מהו המספר הסידורי והדגם של המשדר החכם שלו?

ת: אתה יכול למצוא את המספר הסידורי והדגם של המשדר החכם שלך בחלק האחורי של המשדר החכם שלך. לאחר שחיבורו בין המשדר החכם למכשיר הנידי, אתה יכול גם למצוא את המספר הסידורי והדגם על **Menu > About > My Transmitter** (תפריט > אודות > המשדר שלו).

ש: איך אני מתאים אישיות את שמו של המשדר החכם שלו?

ת: לחץ על **> Settings > System Transmitter Name** (תפריט > הגדרות > שם המשדר). הזן את השם הרצוי. השם המעודכן של המשדר החכם יופיע במסך סטטוס החיבור שלך.

2. בדוק את סמל הסוללה בפינה הימנית
העליונה של מסך **MY GLUCOSE**
(הסוכר שלי). סמל סוללה אדום מראה
שוללת המשדר החכם וריקה.

3. הפעל את המשדר החכם. לחץ ולחזר את
לחץ הפעולה של המשדר החכם. נורית
חיוי כטומה על גבי המשדר החכם מצינית
מתוך סוללה נמוך. נורית חיוי ריקה מצינית
שנתה סוללה טעונה ב-10% לפחות.

ש: בדף **About > My Transmitter (אודות >
המשדר שלי), רמת הסוללה מוצגת כ-
65%. מדויק? 35%.**

ת: קצב פריקת הסוללה משתנה במידה רבה בהתאם
לשימוש; פריקת הסוללה של אותו דגם סוללה
בשני מכשירים שונים לא תבוצע באותו קצב.
לכן אנו מציגים את חיוי טעינת הסוללה במסך
זה במרווחים גדולים: 10%, 35%, 65%, 100%
ו-0%. הבדיקות שלנו מראות שהתרעת "Low
Battery" (סוללה חלה) מתחילה בעקבות
בנוקודה בה למשדר החכם עדין "ישן בערך
שעתיים של הפעלה שנותרו (בערך 10% מרמת
המתנה בסוללה). חשוב להטען את סוללת המשדר
החכם כאשר מתקבלת התרעת "Low Battery"
(סוללה חלה).

סוללת המשדר החכם וטעינה

ש: כמה זמן תעבור סוללת המשדר חכם
טעינה לגמר?

ת: סוללת משדר חכם טעונה למגרי תעבור בדרך
כל בערך 24 עד 36 שעות.

ש: מהו אורך הטעינה של סוללת המשדר החכם?

ת: לוקח כ-15 דקות להטעין משדר חכם כאשר הוא
מחובר אל שקע קיר. הטעינה עלולה לקחת זמן
רב יותר אם היא מתבצעת דרך יציאת USB
במחשב או כאשר מתנה הסוללה ריק למגרי.

ש: מה קורה אם מתה סוללת המשדר החכם ריק למגרי?

ת: לא תצגנה קריאות סוכר. החלף תמיד באופן
 מיידי את סוללת המשדר החכם כאשר היא
התroxונה לחלוטין.

ש: כיצד אוכל לבדוק את מצב סוללת המשדר החכם?

ת: ישן שלוש דרכים לבדוק את מצב הסוללה:

1. לחץ על **Menu > About > My Transmitter** (תפריט > אודות >
המשדר שלי). גלול מטה אל קו רמת
הсолלה שמצינן את כמות מתנה
הסוללה שנותרה.

ש: נראה שאין חיבור בין המשדר החכם ומכשיר הנייד.

- ת: יכולות להיות כמה סיבות בגלן אין לך חיבור.
 - וודא פונקציית ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלך מופעלת ושם או המספר הסידורי של המשדר החכם מופיע בראשית התתקנים.
 - המצלב יכול להיות זמני בלבד. לחץ על **Menu** (תפריט < חיבור). אם ליד שם המשדר החכם שלך מופיעה המילה **Disconnected** (מנוטק), לחץ על שם המשדר החכם על מנת לבצע חיבור יתני.
 - המשדר החכם שלך עלול לא להימצא בטווו הפעולה של המכשיר הנייד שלך. הרץ את המכשיר הנייד שלך קרוב יותר אל המשדר החכם.
 - המשדר החכם שלך עלול להיות כבוי, ללא מתח בסוללה או כרגע במצב טעינה. יכול להיות שהייה צריך לאתחל את פונקציית ה-Bluetooth (BLE) על גבי המשדר החכם על ידי מעקב אחר השלבים הבאים.
 - 1. כבנה את המשדר החכם – לחץ והחזק את החוץ הפעולה למשך 5 שניות והמתן לרטט אשר יאשר שהוא כבוי.
 - 2. המתן שתי שניות ולאחר מכן לחץ על לחוץ הפעולה שלוש פעמים על מנת לאתחל את פונקציית ה-BLE. (**הערה:** בעת ביצוע את פונקציית ה-**BLE**, אל תסיר/ת Schulch את התתקן המחבר דרך הגדרות ה-**Bluetooth** של המכשיר הנייד שלך.)

החיבור עם המשדר החכם

ש: איך אני מ לחבר את המכשיר הנייד שלי אל המשדר החכם בפעם הראשונה?

- ת: עוקבו אחר השלבים למטה על מנת לחבר את המכשיר הנייד שלך אל המשדר החכם. أنا קרא את המדריך למשתמש למידע מפורט יותר.
 1. הפעל את אפליקציית Eversense על חצץ מהבב בצבעים יירוק וכחול, לחץ על מספר הזיהוי של המשדר החכם על גבי מסך **CONNECT** (חיבור).
 2. לחץ על חצץ הפעולה של המשדר החכם שלוש פעמים על מנת לעבור למצב "ניתן לאיתור".
 3. כאשר המשדר החכם מהבב בצבעים יירוק וכחול, לחץ על מספר הזיהוי של המשדר האפליקציה תתחיל את תהליך החיבור.
 - מספר הזיהוי של המשדר החכם שלך זהה למספר הסידורי הרשום על גבי החלוקה האחורי של המשדר החכם שלך.
 4. כאשר האפליקציה מוצאת את המשדר **BLUETOOTH** השלים מסך קופץ **PAIRING REQUEST** (בקשה לשינוי) (BLUETOOTH מופיע).
 5. לחץ על **Pair** (קישור) על מנת לאשר את החיבור.
 6. האפליקציה תציג את המילה **Connected** (מחובר) ליד מספר הזיהוי של המשדר החכם לאחר שהחיבור יושלם.

3. נורית החיווי תתחל להבהיר בטור שתי שניות כדי לציין שהמשדר הכם עבר רצף בדיקות עצמאיות. נורית החיווי מבהירת במגוון צבעים. לאחר שהבדיקה העצמית הושלמה, המשדר החכם ירטוט ו Norit החיווי בצבע ירוק או כתום תישאר דלוכה.

4. אם הבדיקה העצמית לא הושלמה, חזר על שלבים 1 עד 3.

5. אם סיימת בהצלחה את שלב מס' 3, המשדר החכם מוכן לפעולה.

6. נתק את המשדר החכם מכבול-USB והמשך לתהיל' החיבור. לאחר השior, המערכת תעבור לשלב האתחול. אם אין מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר עם שירות לקוחות.

ש: האם אנשים אחרים יכולים להתחבר אל המשדר החכם שלו?

ת: מערכת Eversense E3 CGM עשויה שימוש בchip Bluetooth בטוח והוא לא אפשרי לאחרים להתחבר.

ש: מה קורה אם המשדר החכם שלו מתנתק מן המርשר הנידי שלו או מן האפליקציה?

ת: המשדר החכם ירטוט והאפליקציה תספק הودעה של "משדר מנותק" כל 5 עד 30 דקות על בסיס הגדרות הצליל שלך, עד אשר פותחים את האפליקציה או המשדר החכם מתחבר שוב. לאחר שהחיבור מחדש נקבע, הנתונים שנאספו יונכרכנו עם האפליקציה למקשרים נידים.

לחץ על לחץ הפעלה שוב שלוש פעמים על מנת להעביר את המשדר החכם למסך 'ניתן לאיתור' ולחבר בין ובין המקשרר הנייד שלך. לחץ על **Menu > Connect** על מנת לראות את המשדר החכם שלך מחובר. אם הוא איננו מחובר, לחץ על 'בחר משדר חכם' מתוך הרשימה. אם שלבים אלו אינם פותרים את הבעיה, יתכן שהייה עלייך לגשת להגדרות Bluetooth על גבי המקשרר הנייד שלך ולהסיט או לשוכו את המשדר החכם ולאחר מכן ללחוץ על לחץ הפעלה של המשדר החכם 3 פעמים על מנת לחבר בינם מחדש. אם הבעיה ממשיכת, יתכן שהיא עלייך לאפס את המשדר החכם שלך.

ש: איך אני מפסיק את המשדר החכם שלי?

ת: עקב אחר השלבים למיטה.

1. הניח את המשדר החכם בעיריסת הטעינה וחבר את כבל ה-USB. לחבר את הכבל לשקע קיר. (אתה יכול גם לחבר את הקצה הסטנדרטי של כבל ה-USB אל תוך יציאת ה-USB על גבי המחשב שלך).

2. לחץ והחזק את לחצן הפעלה (למשך
- 14 שניות) במשדר החכם בעודו
מחובר אל כבל ה-USB. שחרר את
לחצן הפעלה.

ש: מהו מצב ”ניתן לאיתור“ (קישור) ?
ת: מצב ’ניתן לאיתור‘ הוא מצב המאפשר למשדר החכם להיות מואтор על ידי המכשיר הנייד שלו על מנת לבצע חיבור. ראה מתחילה למידע נוסף.

ש: המשדר החכם של איננו מופיע על גבי מסך CONNECT (חיבור) ?

ת: המשדר החכם לא יופיע במסך CONNECT (חיבור) בגלל כל אחת מן הסיבות הבאות :

- מתבצעת כוונת טעונה של המשדר החכם דרך USB .
- המשדר החכם כבוי .
- אין מתח בסוללה המשדר החכם .
- ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלו כבוי .
- לא נקבע חיבור בין המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלו או שהחיבור הקיים ”נותק“. אתה צריך לבצע חיבור מחדש .

ש: מדוע אני רואה משדרים חכמים אחרים המופיעים על גבי מסך CONNECT (חיבור) ?

ת: אם משתמשים אחרים במערכת E3 CGM נמצאים קרוב אליו, יתכן, ”אתה והאפליקציה קציה תמצא את המשתמשים הללו. יחד עם זאת, האפליקציה תחבר רק אל המשדר החכם אשר חובר עם המכשיר הנייד שלו. אל תנסה לחבר את המכשיר הנייד שלו למשדרים חכמים אחרים שאינם שלו.

ש: מדוע איני יכול לחבר את המכשיר הנייד שלי למשדר החכם שלי (ההודעה No Transmitter Connected (אין משדר מחובר) מוצגת בשורת המצביע של האפליקציה) ?

ת: יתכן שהחיבור בין המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלו יכשל מכל אחת מן הסיבות הבאות :

- המשדר החכם נמצא כוונת בטעינה .
- המכשיר כבוי .
- אין מתח בסוללה המשדר החכם .
- ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלו כבוי .
- לא נקבע חיבור בין המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלו או שהחיבור הקיים ”נותק“. אתה צריך לבצע חיבור מחדש .

ש: למה אני רואה Searching (חיפוש) על גבי מסך CONNECT (חיבור) ?

ת: האפליקציה תמשיך להראות את המסר Searching (חיפוש) בגלל כל אחת מן הסיבות הבאות :

- המשדר החכם נמצא כוונת בטעינה .
- המכשיר כבוי .
- אין מתח בסוללה המשדר החכם .
- ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלו כבוי .
- לא נקבע חיבור בין המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלו או שהחיבור הקיים ”נותק“. אתה צריך לבצע חיבור מחדש .

כיוול

ש: מהי השעה שאני צריך להזין במסך **CALIBRATE** (כיוול) כאשר אני מקבל הودעה **שלילי לכילוי?**

ת:حزן את השעה בה ביצעת בדיקת סוכר בدم בעזרת מד הסוכר שלך. עליך להזין את תוצאות בדיקת הסוכר בדם במהלך 10 דקות לאחר הביצוע שלך.

ש: **למה הכיוול שלי לא התקבל?**

ת: המערכת לא תקבל את הכיוול שלך בגלל אחת מreasons הבאות:

- קריית הסוכר בדם שהזנת נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל.
- קריית הסוכר בדם שהזנת גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.

אם יש צורך בכיוול נוספת, המערכת תבקש מך לעשות זאת.

ש: **קיבלתי משדר חכם חדש. איך אני מנתק את המשדר החכם הישן ומחבר את המשדר החדש אל המערכת שלי?**

ת: בטור התפריט הראשי, לחץ על **Connect** (חיבור). לחץ והחזק את השם של המשדר הישן שלך. לחץ על **OK** (אישור) על מנת לעצוב את האפליקציה מחיבור אוטומטי אל המשדר החכם החדש. שכח את המשדר הישן שלך מתוך הגדרות-הBluetooth של הטלפון שלך. עקוב אחר השלבים במדריך זה למשתמש על מנת לחבר בין המשדר החכם החדש ואפליקציית Bluetooth אל החיבור החדש שלך.

ש: היכן אני יכול למצאו מידע על שלב הכיוול, מספר הכיוולים שהתבצעו והתאריך והשעה של הכיוול האחרון?

ת: אתה יכול לראות פרטיו כיוול על ידי לחיצה **Menu > About > My Transmitter** (תפריט > אודוט > המשדר שלי).

ש: מהם הסוגים השונים של שלבי הכיוול?

ת: ל מערכת ה-**Eversense E3 CGM** יש שלושה סוגים של שלבי כיוול: שלב האתחול, שלב 2 כיוולים יומיים ושלב כיוול יומי אחד. שלב האתחול מתחילה 24 שעות לאחר החדרת החישין ודורש 4 בדיקות דם מהאצבע של סוכר בدم לכיוול. המערכת תודיע לך אם יש צורך בכיוול אחד או ב-2 כיוולים בכל יום.

ש: מדוע אינני יכול לבצע כיוול?

ת: יתכן ולא תהיה מסוגל לבצע כיוול בגלל אחת מן הסיבות הבאות:

- לא נאספו מספיק נתונים סוכר מן החישין.
- דבר העולם לוקחת כ-5 דקות.
- ערכי הסוכר המגיעים מן החישין משתנים במהלך היום, לדוגמה לאחר אוכל או אינסולין.
- קריאת הסוכר בדם מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל.
- קריאת הסוכר בדם גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.
- קריאת הסוכר בדם נלקחה יותר מ-10 דקות לפני הזנתה באפקטיבית ה-**Eversense**.
- שיעור קריית הסוכר האחרון מן החישין שונה באופן משמעותי מקריאת הסוכר בדם שהוזנה.
- מתבצע כיוול.
- Ubera פחתה משמעותית מן הכיוול המוצלח האחרון.
- המשדר שלך מנוטק.
- המשדר אינו מחובר אל החישין שלך.
- יש צורך להחליף את החישין שלך.

ש: מהו ההבדל בין התרעעה להודעה?

ת: ההודעה היא מסר שאינו קריטי, בעל עדיפות נמוכה (לדוגמה, תזכורת כיול).

התרעעה היא מסר חשוב המציריך את תשומת הלב שלך ויתכן שהיא צורך בתגובהך/**נקיטת פעולות מסוימות**.

ש: מהן התרעעות חיזוי?

ת: התרעעות חיזוי מודיעות לך מראש על אירוע אשר עשוי להתרחש אם המוגנות הקיימת ממשיכת. התרעעות החיזוי עוסקת שימוש ברמות התרעעות לרמות סוכר גבוהות ונמוכות אשר הגדרת על מנת לקבוע את זמן ההתרחשות של התרעעת החיזוי. אתה יכול להגיד את התרעעת כל שהן תודענה לך, 10, 20 או 30 דקות מראש כאשר מערכת-**CGM** תראה שאתה מגיע לרמת הסולר-**MY GLUCOSE** והאפקטיבית שלך תשמיע צליל ועל גבי מסר יודיע לך על רמה חזiosa של סוכר נמוך או גבוה. אם התסמים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחישון, או למאה שהתרעה מצינית, תמיד יש לבצע בדיקת סוכר בدم בעדרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

התרעות והודעות

ת: האם אני יכול לשנות את תבנית התרעעת הרטט על גבי המשדר החכם שלי?

ת: תבניות הרטט של המשדר החכם קבועות ולא ניתן לשנות אותן. עברו התרעות מסוימות ניתן לשנות **Settings** את מרוחת החזרה על התרעעה ב-> **Sound Settings** (הגדרות>הגדרות צליל).

ש: האם אני יכול להגדיל את עצמת הקול עבור התרעעת האפליקציה המגיעות מ-**המכשיר** הנייד שלי?

ת: אתה יכול להגדיל את עצמת הקול עבור התרעעת האפליקציה על ידי חיבור של המכשיר הנייד שלך אל התקן חיצוני על מנת להגבר את הצליל.

ש: האם אני יכול לשנות את מספר התרעעות אוטן אני מקבל?

ת: אם אתה מרגיש שאתה מקבל יותר מדי התרעעות, عليك לשוחה תחילת על הגדרות ההתרעה המתאימות ביותר עבורך עם הוצאות הרפואי שלך. אם אתה צריך לשנות את הגדרות הסוכר שלך, לחץ על > **Menu** > **Settings** הסוכר שלך, לחץ על **Glucose** (תפריט > הגדרות>סוכר).

ש: מהן התרעות קצב השינוי?

ת: התרעות קצב השינוי מודיעות לך כאשר רמות הסוכר שלך נזילות או עולות מהר יותר **Settings** מן הגדרות אותן הזנת ב-> **Glucose** (הגדרות < סוכר).

ש: איך אני משתמש בתראות סוכר?

ת: ניתן להשתיק התראות סוכר על ידי אישור ההתרעה על גבי המCSIר הנידי שלך ונטילת הפעולות המתאימות אם יש צורך בכך.

ש: מהן התראות קצב השינויי?

ת: התראות קצב השינויי מודיעות לך כאשר רמות הסוכר שלך נזולות או עולות מהר יותר מן הגדירות אותן הגדת ב-> **Settings** (הגדרות>סוכר).

ש: מדוע אינני יכול לראות הודעה כאשר האפליקציה נמצאת ברקע?

ת: עין בהוראות עבור המCSIר הנידי שלך על מנת לאפשר את ההודעות מן הרקע.

ש: מה קורה להודעות אם האפליקציה שלוי מתנתקת מן המשדר החכם שלי?

ת: אם האפליקציה מתנתקת מן המשדר החכם שלך, אך אתה נשא את המשדר החכם מעלי החישון, ההתראות שתתקבלו במהלך זמן זה ישלהו לאפליקציה ברגע שהיא תחובר מחדש ותוסנכרן עם המשדר החכם.

ש: איך אני יכול למיין את ההודעות ממשך ALERT HISTORY (ההיסטוריה התראות)?

ת: למסך **ALERT HISTORY** (ההיסטוריה) התראות ישנו מסנן למיון בחלקו העליון. אתה יכול לבצע מיון בהתאם לדרגת החומרה (צהוב וכחול) ולסוג ההתרעה. לחץ על סמל מסנן המיין הרצוי.

18

קְרִיאֹת סָוֶר

ש. מדוע קְרִיאֹת הסָוֶר המגיעה מִן הַחַיִּישׁ
שׁוֹנוֹת מִקְרִיאֹת הסָוֶר בְּדִם שְׁלֵי?

ת: מערכת E3 CGM מודדת סוכר
בנוזל בין-תאי (ISF) הנמצא בין תא הגוף.
הבדלים הפיזיולוגיים בין הנוזל הבין-תאי
לבדם דם בדיגימת דם עשויים לגרום להבדלים
במדידות של רמת הסוכר בדם. הבדלים אלה
ニיכרים במיוחד כאשר מתחכמים שינוי מהירים
ברמת הסוכר בדם (כגון לאחר אכילה, קבלת
מנת אינסולין או פעילות גופנית), ואצל חלק
מהאנשים, במהלך הימים הראשונים לאחר
ההדרה עקב זהום העולול להיגרם כתוצאה
מהליך ההדרה. במשום, חולפות מספר דקות
עד שרמת הסוכר בדם מגיעה לרמת הסוכר
בנוזל הבין-תאי. עד שלא תבין מהם ההבדלים
הלו, אשר את קרייאות החישין עם בדיקות סוכר
בדם המאכבע. כמו כן, אם התסמיינים שלך אינם
מתאימים לערך הסוכר בחוישין, עליך לבצע מיד
בדיקות סוכר בדם מהאכבע.

ש: אֲנִי מַקְבֵּל “-- -- --” קְרִיאֹת סָוֶר מִן הַחַיִּישׁ
עַל גַּבְיוֹ הַאֲפְלִיקְצִיה.

ת: ייתכן ולא תקבל קרייאות סוכר מִן הַחַיִּישׁ כאשר
אין חיבור בין המשדר החכם שלך וחוישן שלך
או בין המשדר החכם שלך והמכשיר הנייד שלך.

אנא עקוב אחר ההוראות אשר סופקו במסר ההודעה
על מנת לפתור את ההתרעה.

渴求 של החלטות טיפול

ש: איזה מידע יש לנקח בחשבון לפני ביצוע של החלטת טיפול?

ת: לפני כל החלטת טיפול, עליך לנקח בחשבון את ערך הסוכר המגיע מהתזונה, את גראף המגמה, את חץ המגמה וכל התרעעה המגיעה ממכלול ה-Eversense E3 CGM. אם חץ המגמה אינו מוצג, המערכת אין מספיק נתונים על מנת להציג את כיוון ושיעור השינוי. אתה לא יכול לנקח החלטות טיפול המבוססות רק על ערך הסוכר בחישון.

ש: מתי עליך לבצע בדיקת דם מהאצבע על מנת לבדוק את רמת הסוכר בדם שלך?

ת: עליך לבצע בדיקת סוכר בדם:

- כאשר הגיע הזמן לכיוול.
- לא מוצג ערך סוכר.
- לא מוצג חץ מגמה.
- התסמנים שלך לא מתאימים למדיע הסוכר המוצג.
- ערך הסוכר בחישון הנוכחי מוצג בצבע אפור.
- שורת המצביע מוצגת בצבע כתום.
- אתה נוטל תרופות מסווג טריציקליין.

ש: למה ערך הסוכר שלי אפור?

ת: כאשר המערכת אין מספיק נתונים על מנת לספק חץ מגמה, ערך הסוכר בחישון עשוי להיות מוצג בצבע אפור. אתה לא יכול לנקח החלטות טיפול המבוססות רק על ערך הסוכר בחישון.

חץ מגמה

ש: חצי המגמה שלי והתרעות הסוכר לא מתאימות.

ת: חצי המגמה מורים על השיעור והכיוון של שני רמות הסוכר. לדוגמה, יתכן ויהי לך חץ מגמה הפונה כלפי מעלה או כלפימטה (המקרה שמיינם מהירותים או אטיים). התרעות הסוכר מודיעות לך כאשר רמת הסוכר הנוכחית שלך מגעה לרמת ההתרעה אותה הגדרת, ללא קשר לשיעור או כיוון השינוי.

ש: חץ המגמה שלי חסר.

ת: מערכת CGM-ים שעשו שימוש ב-**20 הדקות** האחרונות של נתונים סוכר רציפים לחישוב והציג של חצי המגמה. כאשר אין מספיק ערכיוreichישן זמינים לחישוב, החץ לא יוצג. אין לבצע החלטות טיפול אלא אם כן אתה רואה ערך סוכר, חץ מגמה ואתה לווקח בחשבון את ההתרעות והמגמות האחרונות.

האפליקציה

ש: מה יקרה אם אני מתקין מחדש את האפליקציה?

ת: כאשר אתה מתקין מחדש את האפליקציה, האפליקציה תוריד נתונים היסטוריים מ-3 הימים האחרונים בלבד.

ש: מהו גרסה האפליקציה המותקנת במכשירי הנידד שלי?

ת: אתה יכול למצוא את גרסת תקנת האפליקציה על ידי לחיצה על **Menu > About > Product** (תפריט < אודוט > מידע על המוצר).

ש: איך ניתן עדכון של האפליקציה שלי?

ת: עקוב אחר ההורר ושמור את האפליקציה שלך מעודכנת באמצעות App Store Apple או Google Play Store.

ש: מהם המכשירים התואמים לאפליקציית Eversense?

ת: בקר באתר [https://global.eversensediabetes.com/compatibility](https://global.eversensediabetes.com/) עבור רשימה של מכשירים תואמים.

ש: האם אני עדין יכול להשתמש במכשיר החכם אם אני מחליף את המכשיר הנידד שלי למכשיר חדש?

ת: יהיה עליך להתקין את האפליקציה על גבי המכשיר החדש שלך ולחבר אותו עם המשדר החכם שלך. 3 הימים האחרונים של נתונים ההיסטוריים יסונכרנו עם האפליקציה על גבי המכשיר החדש שלך.

ש: מודיע שורת המצב שלי מודיע "syncing" (מסנכרן)?

ת: "Syncing" יופיע בשורת הסטטוס כאשר האפליקציה על גבי המכשיר הנייד שלך מתחברת אל המshedר החכם שלך.

ש: הגדרות הסוכר שלי והגדרות הפרופיל הזמן שלי אפורות ואני יכול להתחאים אותן.

ת: אתה צריך לקשר את האפליקציה שלך אל המshedר החכם שלך על מנת להיות מסוגל להתחאים את הגדרות הסוכר והגדרות הפרופיל הזמן שלך.

ש: האם אני יכול לעורוך הדנה ידנית של אירוע של סוכר בدم?

ת: הדנות ידניות של אירועי סוכר בדם והזנות יכול לא ניתנות לערכיה.

ש: אם אני מחביא אירוע, האם אוכל לשחזר אותו מאוחר יותר?

ת: לא ניתן לשחזר אירועים אשר הוחבאו.

ש: אלו טווחי חזרה אני יכול להגדיר עבור סוכר גבוה ונמוך?

ת: עבור סוכר גבוה, טווח החזרה יכול להיות 15 עד 180 דקות, בטווחים של 15 דקות כל אחד. עבור סוכר נמוך, טווח החזרה יכול להיות 5 עד 30 דקות, בטווחים של 5 דקות כל אחד.

ת: מהיקת החשבון היה קבוצה, אז לא תהיה לך עוד גישה אל נתוני CGM באפליקציה לטלפון Eversense Mobile DMS שלך. אם אתה משתמש באפליקציה Eversense NOW, לא תוכל עוד להציג לטלפון את נתוני CGM. לא ניתן להשתמש באותה כתובת דוא"ל כדי ליצור חשבון חדש. כדי למחוק את החשבון, יש להקש על Delete Account (מחק חשבון) בעמוד הכניסה אל המערכת.

ש: מהי אופציית 'נא לא להפריע'?

ת: כאשר פונקציית 'נא לא להפריע' מוגדרת בהגדרות אפליקציית Eversense, האפליקציה תפסיק להציג הודעות שאין לך רצויות. המshedר החכם יפסיק לספק התרעותרטס עבור התרעות שאין לך רצויות. ההטעות קרייטיות המשכנה להתקבל באמצעות המshedר החכם והאפליקציה במכשיר הנידי.

שים לב שהתקונה נא לא להפריע בטלפון החכם שלך גוברת על האפשרות המקבלת באפליקציה. כך שאתה התקונה נא לא להפריע מופעלת בטלפון החכם שלך, אתה לא תקבל את התרעות על גבי המshedר החכם או באפליקציה. יחד עם זאת, עם מערכות הפעלה מסוימות עבור טלפונים אתה יכול לאפשר התרעות סוכר נמוך כך שייעברו מעל להגדרות הקול של הטלפון שלך. ראה הגדרות ציל למידע נוספת. הינה מודע לעובדה שישן אפליקציות אשר תפעלנה באופן אוטומטי את תכונות 'נא לא להפריע' בטלפון שלך.

חישון

ש: האם ניתן להחדיר את החישון במקום אחר מאשר החלק העליון של הזרוע שלו?

ת: מערכת CGM E3 Eversense נסודה במחקריהם קליניים רק בחלק הזרוע העליון או להחדיר את החישון בכל מקום אחר.

ש: متى אני צריך להחליף את החישון שלו?

ת: החישון שלך יפעל עד 180 ימים. אתה תקבע הבדיקות תקופתיות (60, 30, 14, 7, 3, יום אחד לפני) כדי להזכיר לך מתי יש צורך להחליף את החישון. צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת לקבוע החלפת חישון.

ש: האם יכול להאריך את חיי החישון?

ת: החישון לא יספק יותר קריאות סוכר לאחר שפג תוקפו של זמן הנשיהה שלו.

ש: היכן אני יכול למצוא את המספר הסידורי של החישון שלו?

ת: אתה יכול לראות את המספר הסידורי של החישון **Menu > About > My Sensor** שלך על ידי לחיצה על **Sensor** (תפרט>About>החיישון שלו).

- מושדר חדש קשור אל החיבור הקיים שלך. לדוגמה, אם החלפת את המושדר החדש שלך.
- אם התבקשת על ידי שירות הליקוחות לחבר מחדש את החיבור שלך.

ש: האם זה בסדר שטכני MRI ישא את מערכת Eversense E3 CGM?

ת: כן, זה בסדר שטכני MRI ישא את מערכת Eversense E3 CGM. יחד עם זאת, עבור אנשים העוברות בבדיקה MRI עם שדה מגנטי סטטי של 1.5 טסלה או 3.0 טסלה, החיבור יכול להישאר במקומו מתחת לעור, אך את המושדר החיבור יש להסיר ולהשאיר מחוץ לחדר. ראה מידע בטיחות ב绷גע ל-MRI למידע נוסף.

ש: מדוע אני רואה הודעה "New Sensor Detected" (זיהה חיבור חדש)?

ת: מסר זה מופיע כאשר המושדר החכם שלך מאתר חיבור חדש ואתה יכול לבצע קישור בין המושדר החכם והחיבור. ניתן לקשר את המושדר החכם לחיבור אחד בלבד בכל פעם. אם אתה רואה מסר כביר יש לך חיבור ומוקשור אל המושדר החכם שלך, לחץ על **Not Now** (לא עכשיו). אם אנך בכוון, צור קשר עם שירות הליקוחות למידע נוסף.

ש: מדוע מערכת-hCGM שלי נכנסת שוב אל שלב האתחול?

ת: אתה תיכנס שוב אל שלב האתחול בגלל אחת מהנסיבות הבאות:

- פג תוקפה של תקופת הכילוי בל' שהזנת ערך בדיקה באמצעות דגימת דם מהאכבע.
- 3 קראיות סוכר בدم או יותר שונות באופן משמעותי מקריאות הסוכר הנוכחות של החיבור.
- המושדר החכם שלך לא נתען בטוחו של 16 שעות מהופעת ההתרעה על סוללה ריקה.
- אם אתה משנה באופן יידי את השעה על גבי המכשיר הנדי שלך, המושדר החכם שלך יבצע סyncron ויתבצע אתחול עם המכשיר הנדי שלך.

אירועים

ש: מודיעו לפעמים אני רואה סרגל התקדמות כחול
ולבן לרוחב החלק העליון של המסר שלי?

ת: אתה תראה את סרגל ההתקדמות הנ"ל לסנכרון
מכמיה סיבות:

- המשדר החכם שלך לא נמצא בטוויה
החיישן שלך לתקופה מסוימת והוא
מבצע סנכרון מחדש.
- סגרת לגמרי את אפליקציית Eversense
ולאחר מכן פתחת אותה שוב.
- סוללה המכשיר הנייד שלך התרוקנה והוא
נטען מחדש.

סנכרון

ת: מסך EVENT LOG (יומן אירועים) כולל
מסמך למיון בחלק העליון של המסך. לחץ על
סמל מסנן המיון הרצוי כדי לכלול ולא לכלול
אירועים ברשימה. אפשרות המיון המוגדרת
כברירת מחדל היא הצגת כל האירועים.

קיצורי דרך

ש: האם יש קיצור דרך אל מסך CONNECT (חיבור)?

ת: אם המסדר החכם שלך אינו מחובר אל האפליקציה, אתה יכול ללחוץ על שורת המצב בחלק העליון של העמוד עד מנת להציג את מסך CONNECT (חיבור).

ש: האם יש קיצור דרך אל מנת להציג אירוע מסוים, כגון ארוחות או פעילות גופנית?

ת: מסך EVENT ENTRY MY GLUCOSE (הסוכר שלי), לחץ על EVENT ENTRY (הכנסת אירוע).

ת: כן, לחץ על סרגל "היום" מעל לגרף. יופיע חלון קופץ על מנת שתוכל לבחור את התאריך הרצוי אשר יוצג על הגרף.

ש: אם אני צופה בתאריך/שעה בעבר במסך CONNECT (הסוכר שלי), האם יש קיצור דרך לחזרה לתאריך והשעה הנוכחיים?

ת: כן, לחץ על ערך הסוכר/חץ המגמה על מנת לחזור לתאריך/שעה הנוכחיים על גבי מסך HISTORY (ההיסטוריה התרעת).

ש: האם יש קיצור דרך אל מסך ALERT (ההיסטוריה התרעת)?

ת: אם המסדר החכם שלך מחובר אל האפליקציה, אתה יכול ללחוץ על שורת המצב בחלק העליון של העמוד עד מנת להציג את מסך ALERT (ההיסטוריה התרעת).

19. ביצוע הבדיקה

חלק זה מציג את מאפייני ביצוע הבדיקה.

ביצוע מחקר קליני

הבדיקות והיעילות של מערכת-hG- CGM Eversense E3 הוערכו במחקר הקליני PROMISE אשר התקנה באלה"ב. הנתונים הכלולים בחלק זה של ביצוע הבדיקה מתבססים על הנתונים אשר נאספו במהלך מחקר PROMISE עם אלגוריתם חדש (SW604) ושינוי קל בעיצוב החישון (חישון E3). העריכות דיקוק בוצעו בנקודות מגוונות במהלך המבחן והמשתתפים התקשו לדוח על כל תופעת לוואי במהלך המבחנים. חלק הבטיחות משקף את כל משתתפי המבחן (=181).

PROMISE מחקר קליני

מחקר PROMISE היה מחקר קליני רב אטררי, צפוי, לא אקראי ורב חשיבות. מהה שמותנים ואחד (181) מבוגרים (בגיל 18 ומעלה) הסובלים מסוכרת מסוג 1 או מסוג 2 השתתפו במחקר ב-8 אתרים ברחבי ארה"ב. לתשעים ושישה (96) משתתפים הוחדרו שני חישונים, אחד בכל צד. ארבעים ושלושה (43) מן החישונים המשניים היו חישוני SBA. המשתתפים ביצעו אינטראקציה עם המערכת בכדי לכיל ולהתיחס להודעות שאינן הקשורות לנוטוני הסוכר. כל ההחלטות הקשורות לטיפול בסוכרת התבפסו על ערכיו סוכר בدم ועל הטיפול הקליני הסטנדרטי. הדיקוק נמדד במהלך ביקורי מרפאה שארכו יומם שלם כל אחד. ביקורים אלו התרחשו ביום סטנדרטי ידוע-C-BSI-Y. נרוכה השוואה בין קריאות הסוכר באותו הזמן בין מנתה הייחוס והמכשיר הרציף. ביקור מעקב התרחש עשרה ימים לאחר הסרת החישון.

***PROMISE – דיק אל ISI ב-**

MARD	אחוז של קרייאות מערכת CGM בתווך				מספר כולל של ערכי CGM ו-ISI מחוברים
	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס	
8.5%	99.6	98.6	93.9	87.3	12,034

*ערכי סוכר בין 40 ו-400 מ"ג/ד"ל.

דיק אלי YSI במחקר PROMISE E3

הבדיקה נמדדת על ידי השוואת ערכו הסוכר בחישון E3 אל ערכו סוכר בدم YSI. עבור ערכו סוכר בדם הנמוכים או השווים אל 80 מ"ג/ד"ל, חושב ההבדל המוחלט הממוצע בין שתי התוצאות. עבור ערכים הגדולים מ-80 מ"ג/ד"ל, חושב ההבדל היחסי המוחלט הממוצע.

טבלה 2 – דיק אלי YSI במחקר *PROMISE E3

הבדל ייחסי מוחלט ממוצע	מספר קרייאות CGM-ysi מחוברות	טווח סוכר YSI (מ"ג/ד"ל)
8.5	12,034	סך הכל
--	0	*40 >
7.5	592	*60 - 40
7.7	1,221	*80 - 61
8.6	5,067	180 - 81
7.4	3,300	300 - 181
6.9	1,457	350 - 301
6.4	375	400 - 351
9.5	25	400 <

*עבור YSI ≥ 80 מ"ג/ד"ל, ההבדלים במ"ג/ד"ל כוללים במקומות הבדל אחוזים (%).

הביבט גם נמדד על ידי חישוב אחוז קרייאות הסוכר בחישון בטור 15 מ"ג/ד"ל או 15% של ייחוס ה-ISI. טבלאות אלו מראות את הסכמת האחוזים במספר רמות, בטוחה סוכר שונים ובימים שונים במהלך נסיאת החישון. התוצאות בטוחה סוכר של 80 מ"ג/ד"ל או פחות משקפות את אחוז הערכים בטור המ"ג/ד"ל, וההתוצאות בטוחה סוכר הגבוהים מ-80 מ"ג/ד"ל משקפות את האחוז בחישון. לדוגמה, ערך סוכר בין 40 ו-60 מ"ג/ד"ל הוא בטור 15 מ"ג/ד"ל של ערך הייחוס 91.6% בכל הזמן.

טבלה 3 – אחוז קרייאות E3 בסך הכל בהסכם במחקר PROMISE

אחוז של קרייאות מערכת CGM בטור					CGM ו-ISI ייחוס מחוברים	טוויס סוכר מערכת CGM (מ"ג/ד"ל)
אחוז 40/40% < של ייחוס	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס		
0.4	99.6	98.6	93.9	87.3	12,034	סך הכל
0.7	99.3	98.6	96.5	91.6	574	60 - 40
0.2	99.8	98.9	93.8	89.7	1,178	80 - 61
0.4	99.6	98.5	93.2	85.1	5,078	180 - 81
0.4	99.6	98.4	93.7	87.0	3,493	300 - 181
0.4	99.6	99.2	96.8	93.3	1,191	350 - 301
0.4	99.6	98.7	93.8	87.3	520	400 - 351

טבלה 4 – דיווק מערכת CGM Eversense E3 על פי ימים

אחוז של קרייאות מערכת CGM בתוך					הבדל יחסי מוחלט ממוצע	ימים
אחוז 40/40% < של ייחוס	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס		
0.7	99.3	96.5	87.4	78.6	11.2	1 יום
1.5	98.5	94.7	88.0	81.9	10.0	7 ימים
0.0	100.0	99.0	95.0	87.4	7.4	14 ימים
0.1	99.9	99.2	95.7	88.9	8.4	22 ימים
0.7	99.3	98.2	93.4	85.8	8.2	30 ימים
0.2	99.8	98.6	94.2	87.9	8.6	60 ימים
0.1	99.9	99.8	97.1	93.1	7.0	90 ימים
0.1	99.9	99.6	96.1	89.2	8.4	120 ימים
0.1	99.9	99.5	91.9	84.0	8.8	150 ימים
0.3	99.7	99.3	98.0	93.1	7.4	180 ימים

ביצוע התרעת E3

הטבלאות בחלק זה מראות הרכבת ביצוע, התרעה שיעור איתור האירור המאושר מראה את אחוז הזמן שמערכת Eversense E3 CGM אישרה את ערך הייחוס על ידי הצגה של התרעה בתוך חלון זמן של 15 דקות של ערך ייחוס מעבר לסוף ההתרעה המוגדר. שיעור האיתור המאושר מראה את אחוז הזמן שמערכת Eversense E3 CGM לא הציגה התרעה בתוך חלון זמן של 15 דקות של ערך ייחוס מעבר לסוף ההתרעה המוגדר. שיעור ההתרעה האמיתית מראה את אחוז הזמן שבו ההתרעה ממוקמת-h-CGM אושר על ידי ערך הייחוס בתוך חלון זמן של 15 דקות מזמן ההציגה של ההתרעה. שיעור ההתרעה הכווצב מראה את אחוז הזמן שבו ההתרעה ממוקמת-h-CGM לא אושר על ידי ערך הייחוס בתוך חלון זמן של 15 דקות מזמן ההציגה של ההתרעה.

הטבלה למטה מראה הערה של יכולת מערכת CGM-E3 Eversense לארור רמות סוכר גבהות ונמוכות והיא מעריכית התרעות חיוביות אמיתיות בנגוד להתרעות חיוביות כוזבות. ניתן לראותו אונן כאחוז של התרעות אשר ניתנו ביחס לערכי הייחוס YSI בספירים שונים.

טבלה 5 – ביצוע התרעות סוכר גבהות ונמוכות של E3 PROMISE (ס"כ בלבד) במחקר

שיעור התרעה כוזב	שיעור התרעה אמתית	שיעור איתור משמעותי	שיעור איתור אישור מאושער	הגדלת התרעה (מ"ג/ד"ל)	
18%	82%	24%	76%	60	התרעה נמוכה
10%	90%	11%	89%	70	
8%	92%	7%	93%	80	
7%	93%	4%	96%	90	
3%	97%	1%	99%	120	
4%	96%	1%	99%	140	
5%	95%	2%	98%	180	
5%	95%	3%	97%	200	
5%	95%	3%	97%	220	
6%	94%	3%	97%	240	
10%	90%	12%	88%	300	

הטבלה למטה מראה הערכה של יכולת מערכת CGM-Eversense E3 למדוד התרעות גבוהות, נמוכות, והתרעות מנבאות גבוהות ונמוכות, והיא מעריכה התרעות חיוביות אמיתיות בוגדיות להתרעות חיוביות כזוברות. ניתן לראות את זה באמצעות אורך אשר ניתן ביחס לערכי הייחוס ISI וSY בספירים שונים.

טבלה 6 – ביצוע התרעות גבוהות, נמוכות ומנבאות של Eversense E3 (סך בלבד) במחקר PROMISE

שיעור התרעה כזובר	שיעור התרעה אמיתית	שיעור איתור מפוספס	שיעור איתור אירוע מאושר	הגדלת התרעה (מ"ג/ד"ל)	התרעה נמוכה
27%	73%	10%	90%	60	
16%	84%	6%	94%	70	
13%	87%	3%	97%	80	
11%	89%	2%	98%	90	
4%	96%	1%	99%	120	
5%	95%	1%	99%	140	
7%	93%	1%	99%	180	
7%	93%	1%	99%	200	
8%	92%	2%	98%	220	
9%	91%	2%	98%	240	
13%	87%	8%	92%	300	

הסכם מגמת שיעור השינוי Eversense E3

האזור המוצל בטבלה למטה מראה את ההסכמה בין מגמות הסוכר של Eversense E3 ומגמות הייחום ISI בעוד שמדובר בסוכר היא בשיעורים שונים (מ"ג/ד"ל לדקה). לדוגמה, כאשר מגמת הסוכר נעה בשיעור ISI בין 1- 0.1 מ"ג/ד"ל/דקה, מגמות הסוכר של Eversense E3 מסכימות עם מגמות הייחום ב-90% מן הזמן.

טבלה 7 – הסכם מגמת שיעור השינוי Eversense E3 במחקר PROMISE

ס"ר הכל	אחוז של חיבורים תואמים בשיעור השינוי של הייחום (מ"ג/ד"ל/דקה) בכל טווח מגמת ייחום עבור כל טווח CGM ROC					מגמת CGM (מ"ג/ד"ל/דקה)
	2 <	[2 ,1)	[1 ,-1]	(-1 ,-2]	-2 >	
163	0%	0%	41%	35%	24%	-2 >
824	0%	0%	59%	36%	4%	(-1 ,-2]
8,716	1%	5%	90%	4%	0%	[1 ,-1]
896	11%	42%	46%	1%	0%	[2 ,1)
336	35%	40%	24%	0%	0%	2 <
10,935						

ההסכמה הכללית של Eversense E3 עם ערכי ISI

האזור המוצל בטבלאות למטה מראה איזה אחוז של ערכי ISI היו באותו הטווח של ערכי הסוכר בחישון. לדוגמה, כאשר הסוכר בחישון הוא בין 81 ו-120 מ"ג/ד"ל, ערכי ISI ישיים באותו הטווח ב-76% מן הזמן.

טבלה 8 – הסכמה כללית עם טווח ISI בכל הימים במחקר PROMISE

אחוז של חיבורים תואמים בכל טווח סוכר ISI עבור כל טווח סוכר ISI (מ"ג/ד"ל)													מספר קריאות CGM-ISI מחוברות	CGM (מ"ג/ד"ל)
400 <	351-400	301-350	251-300	201-250	161-200	121-160	81-120	61-80	40-60	> 40				
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	36%	62%	0%	574	60 - 40		
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	66%	19%	0%	1,178	80 - 61		
0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	76%	11%	0%	0%	2,066	120 - 81		
0%	0%	0%	0%	0%	14%	71%	14%	0%	0%	0%	2,067	160 - 121		
0%	0%	0%	0%	13%	66%	21%	0%	0%	0%	0%	1,648	200 - 161		
0%	0%	1%	15%	68%	15%	1%	0%	0%	0%	0%	1,437	250 - 201		
0%	1%	25%	56%	17%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1,353	300 - 251		
0%	12%	70%	17%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,191	350 - 301		
5%	42%	51%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	520	400 - 351		
26%	52%	21%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	155	400 <		

טבלה 9 – הסכמה כללית עם טווח YSI ביום 1 במחקר PROMISE

אחוז של חיבורים תואמים בכל טווח סוכר YSI עבור כל טווח סוכר YSI CGM (מ"ג/ד"ל)												מספר קוריאות CGM-ysi מחוברות	CGM מ"ג/ד"ל
400 <	351-400	301-350	251-300	201-250	161-200	121-160	81-120	61-80	40-60	40 >			
0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	45%	51%	0%	120	60 - 40	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	54%	10%	0%	146	80 - 61	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	70%	5%	0%	0%	271	120 - 81	
0%	0%	0%	0%	3%	21%	62%	14%	0%	0%	0%	202	160 - 121	
0%	0%	0%	0%	16%	51%	33%	0%	0%	0%	0%	124	200 - 161	
0%	0%	0%	27%	51%	19%	4%	0%	0%	0%	0%	75	250 - 201	
0%	0%	18%	57%	24%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	121	300 - 251	
0%	0%	64%	33%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86	350 - 301	
0%	9%	84%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58	400 - 351	
0%	48%	48%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25	400 <	

הסכם יציבות כיל

הטבלה למטה מראה את אחוז ערבי הסוכר בחו"ש אל ייחוס-ISI-Y בנקודות זמן שונות לאחר הزنת כיל. לדוגמה, בטבלה למטה, 89.7% מערכי Eversense E3 נמצאים בתוך 15 מ"ג/ד"ל (עבור קריאות ייחוס של 80 מ"ג/ד"ל או פחות), ובתוך 15% (עבור קריאות ייחוס הגבוהות מ-80 מ"ג/ד"ל) של ערך הייחוס בתוך 8 עד 10 שעות לאחר הزنת הכיל.

טבלה 10 – הסכם יציבות כיל Eversense E3 במחקר PROMISE

אחוז של קריאות מערכת CGM בתוכן					מספר קריאות ISI-YSI מוחברות	זמן שעבור מן הכיל
אחוז 40/40% < של ייחוס	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס		
0.1	99.9	98.7	94.1	88.8	2,638	(2,0] שעות
0.5	99.5	98.5	94.4	87.2	1,905	(4,2] שעות
0.7	99.3	98.1	93.3	85.3	1,404	(6,4] שעות
0.4	99.6	97.7	91.5	83.0	1,043	(8,6] שעות
0.4	99.6	98.8	93.9	89.7	1,041	(10,8] שעות
0.5	99.5	97.7	94.1	87.8	1,091	(12,10] שעות
0.7	99.3	99.0	93.4	85.8	590	(14,12] שעות
0.0	100.0	100.0	91.8	82.7	440	(16,14] שעות
0.0	100.0	99.5	93.9	87.6	379	(18,16] שעות
0.3	99.7	98.4	97.0	90.0	370	(20,18] שעות

טבלה 10 – הסכמת יציבות כיול PROMISE Eversense E3 במחקר (המשך)

אחוז של קרייאות מערכת CGM בתווך					מספר קרייאות CGM-ISYS מוחברות	זמן בעבר מן הכויל
אחוז 40/40% < של ייחוי	אחוז 40/40% של ייחוי	אחוז 30/30% של ייחוי	אחוז 20/20% של ייחוי	אחוז 15/15% של ייחוי		
0.2	99.8	99.5	94.5	88.3	436	(22, 20] שעות
0.2	99.8	99.4	96.2	89.7	522	(24, 22] שעות
0.0	100.0	99.4	98.2	93.5	168	(26, 24] שעות
0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	7	(28, 26] שעות

ח'י החישון

ח'י החישון נמדדים כאחוז החישונים المسؤولים לתפקד לכל תקופה - 180 ימים המיעודת לכך. במחקר PROMISE, 90% מן החישונים תפקדו לכל תקופה - 180 ימים. מספר הימים הממוצע היה 175.

אחוז החישונים שהחזיקו מעמד 60, 120 ו-180 ימים

מספר ממוצע של ימים	ח'י החישון	ימים
175	98%	60
	98%	120
	90%	180

בטיחות

מחקר PROMISE ארכ' 180 ימים בהם תועד מספר אירועי הלואוי המוקשרים אליו. מערכת ה-Eversense E3 CGM נסבלה היטב חלק מן המחקר. במהלך 31,373 הימים בהם החישון נישא חלק מן המחקר, לא תועדו אירועי לואוי לא צפויים. חמישים ושבעה אירועי לואוי תועדו עבור 37 משתתפים. אף אחד מאירועי הלואוי לא הסתיים באשפוז.

טבלה 11 – אירועי לואוי (כל המשתתפים, 181 = ח)

מספר משתתפים (% מהתשתתפים)	מספר אירועים	סוג אירוע
(20.4) 37	59	
(6.1) 11	16	פריחה בעור, מיקום מדבקה דביקה או אתר החדרה (כולל אדמנת, עקצוץ, פריחה, דרמטיטיס מגע, סרומה)
(2.2) 4	4	דילול עור
(1.7) 3	4	היפופיגמנטציה
(1.1) 2	2	ziehom (קשר להליר)
(0.6) 1	1	ziehom (לא קשר להליר)
(6.1) 11	19	חבלת
(1.7) 3	3	דימום
(3.3) 6	7	כאב
(0.6) 1	1	חווסר תחושה בזרוע
(0.6) 1	1	צמרמות
(0.6) 1	1	רצעת הסגירה של המדבקה הדביקה לא החזקה

20. נתוניים טכניים

חישון

מאפיינים	תיאור
מידות	אורכו: 18.3 מ"מ קוטר: 3.5 מ"מ
חומרים	הומופולימר פולימתיל מתאקרילט mg 86 - (PMMA), הידרוג'ל על בסיס הידרוקסיאתיל-מתקרילאט (HEMA) המכיל אנדיקטור סוכר - 2.0 מ"ג, פלטינה - 0.012 מ"ג, סיליקון - 4.1 מ"ג, דקסמתזון אצטט - 1.7 מ"ג, דבק אפוקסי-2 301 - 0.62 מ"ג
טווח הסוכר	40 - 400 מ"ג/ד"ל
חי' החישון	עד 180 ימים
כיול	מד סוכר בدم הזמן מסחרית לניטור עצמי
טווח כיול	40 - 400 מ"ג/ד"ל
חיטוי	מעוקר על ידי אטילן אוקסיד

משדר חכם

מאפיינים	תיאור
מידות	אורך: 37.6 מ"מ רוחב: 48.0 מ"מ עובי: 8.8 מ"מ
חומרים	גוף: פוליקרבונט
משקל	11.3 ג'
מקור מתח	סוללות ליתיום-פולימר הנитנות לטעינה (לא ניתנות להחלפה)
תנאי הפעלה	5-40 °C (41 - 104 °F)
חיי פעולה	12 חודשים
תנאי אחסון	0-35 °C (32 - 95 °F)
הגנה מפני לחות	IP67: נטבל במים עד לעומק של מטר אחד לתקופה של עד 30 דקות
הגנה מפני שוק חשמלי	חלק מיושם סוג BF
זמן טעינה על ידי שימוש במתאם AC	15 דקות עד לטעינה מלאה
מרחיק תקשורת	בין האפליקציה והמשדר החכם הוא עד 24.9 רג'ל התקשורת האלחותית אל האפליקציה לא תתפרק היבט כאשר מתבצעת תקשורת דרך מים. הטווח יופחת אם אתה נמצא באmbutיה, על גבי מיטת מים, בברכה, וכו'.
לחץ התא	hPa 1060 עד 700
טוווח לחות יחסי (ללא עיבוי)	עד 90% 15%
גובה מעל פני הים	10,000 רג'ל

20

מקור מתח ומטען

מאפיינים	תיאור
סוג	
קלט	קלט זרם חלופי, 50/60Hz, 0.3-0.15A 100-240Vac
פלט זרם ישיר	פלט 5V DC, 1A (5.0 וולט)
הגנה מפני לחות (עריסת טעינה)	IP22

cabl USB לטעינה והורדת נתונים

מאפיינים	תיאור
קלט/פלט	5V DC, 1A
סוג	USB-A ל-USB-B מיקרו
אורך	91 ס"מ (36 אינץ')

*אם נעשה בו שימוש לא נכון, cabl USB עלול להוות סכנת חניה. ניתן לחבר את cabl USB אל מקור המתח/הטען ולבצע טעינה על ידי שימוש בשקע מתח זרם חלופי. על מנת לבדוק את המערכת, נתקן את המטען/מקור המתח מן התקע. אם אתה מטעים את המסדר החכם על ידי שימוש ביציאת USB על גבי המחשב האישי שלך, וודא שהמחשב האישי שלך עומד בתקן הבטיחות-1 IEC 60950-1 (או דומה).

תקנים شمالיים ותקני בטיחות

הדרכה והצורה היצן – חסינות אלקטرومגנטית

המשדר מיועד לשימוש בסביבה אלקטромגנטית המצוינת בטבלה הבאה. הלוק או המשטמש במשדר צריך להבטיח שנעשה בו שימוש בסביבה שכזו.

מפורט חסינות אלקטرومגנטית עבור המשדר

הנחייה לסייע אלקטромגנטית	רמת הצוות של המשדר	בדיקה חסינות	בדיקה חסינות
על הרצפות להיות מעץ, בטון או אריחי קרמיקה. אם הרצפות מצופות בחומר סינטטי, על הלחחות היחסית להיות לפחות 30%.	$\pm 8 \text{ kV}$ חיבור $\pm 15 \text{ kV}$ אוויר	$\pm 8 \text{ kV}$ חיבור $\pm 15 \text{ kV}$ אוויר	פליטה אלקטростטית (ESD) IEC 61000-4-2
השדות המגנטיים של תדיות המתאימים לצרכים להיות ברמות המאפיינות מקום טיפוסי בסביבה מסחרית או סביבת בית חולים טיפוסית.	A/m 30	A/m 30	תדיות מתה 110VAC/60Hz, (230VAC/50 Hz שדה מגנטי IEC 61000-4-8

תקנים شمالיים ותקני בטיחות (הmarsh)

מערכת Eversense E3 CGM מיועדת לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת בטבלה למטה. משתמשי המערכת יודאו שהוא בשימוש בהתאם להוראות אלו.

הוראות החסינות האלקטרומגנטית של המערכת

מדד רף סביבה אלektromgnetit	רמת היצואת של המשדר	IEC 60601 רמת בדיקה	בדיקה חסינות
תיכון הפרעה בסביבת ציוד המסומן עם הסמל הבא: 	Vrms 3	\leq Vrms 3 עד kHz 150 (MHz 80)	RF מוליך IEC 61000-6-4-3 (טלפון חכם בלבד (מכ舍יר מתקבֵל))
	Vrms 3	\leq V/m 10 עד MHz 80-2700 (apanion AM)	RF מוקן IEC 61000-4-3

הערה 1: ב- 80 MHz ו- 800-800 MHz, טווח המדידות הגדולה יותר מיושם.

הערה 2: תיכון ו��ויים מנחמים אלו לא יהיו נכונים לכל המכבים. ההתקפות האלקטרומגנטית מושפעת מקליטה וקרינה מבנים, עצמים ואנושם.

א. חזק שדה ממשדרים קבועים, כגון תחנות בסיס עבור טלפון סלולרי/אלחוטיות (רדיו ומכשירי רדיו קרקע נידים, רדיו FM ו-AM וSSIDיו טלייזיה לא נוינאים לחיזוי תאווטי בדיק). על מנת להעניר את הסביבה האלקטרומגנטית הנגרמת בשל משדרי RF קבועים, יש לקחת בחשבון סקר אלקטרומגנטי של האזור. אם חזק השדה הנמדד במקום בו מערכת

Eversense E3 CGM נמצאת בשימוש RF-המישושת הנ"ל, יש לוודא שמערכת Eversense E3 CGM מתחילה. אם מבחנים במקומות שאינם נורמליים, יתכן שהיא צריכה צורך בעודים נוספים, כגון הכוונה מחדש או מיקום חדש פועלת הcalculation. Eversense E3 CGM

ב. מעל טווח המדידות 150 kHz עד MHz, חזק השדה צריך להיות פחות מ- 10 m/V.

תקנים شمالיים ותקני בטיחות (הmarsh)

הדראה והצורה היצרן – פלייטות אלקטرومגנטיות

מערכת Eversense E3 CGM מיועדת לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המופיעה בטבלה למטה. ליקוחות או משתמשי המערכת יודאו שהוא בשימוש בהתאם להוראות אלו.

הנחייה לסביבה אלקטромגנטית	ציות	בדיקה פליטה
מערכת ה-E3 CGM Eversense עשויה שימוש באנרגיית RF עבור תפקוד פנימי בלבד. לכן, פלייטות ה-RF שלה מאוד נמוכות וקיים סיכוי נמוך שהמערכת תיצור התערבות בצד חשמלי הנמצא בקרבת מקום.	קבוצה 1	פליטות RF CISPR 11
מערכת CGM Eversense מתאימה לשימוש בכל הממסדים כולל בתים ואלו המוחברים באופן ישיר לרשת אספקת החשמל הציבורית במתוח נמוך המסופקת לבניינים המשמשים למטרות מגוריים.	וגם B	פליטות RF CISPR 11

מרחקי הפרדה מומלצים בין ציידי תקשורת RF נישאים/ניידים אחרים והטלפון החכם (המכשיר המקובל)

עליהם בהתאם להוראות היצרן של הטלפון החכם (או מכשירים אחרים) בוגר לגדרה. הלוקו או המשתמש בטלפון החכם (או הכל מכשיר מקבל אחר) יכול לעוזר למנוע הפרעה אלקטرومגנטית על ידי שימירה של מרחק מינימלי בין ציידי תקשורת RF נישאים/ניידים אחרים (משדרים) והטלפון הנידי של לפחות 30 ס"מ (12 אינץ'). ציידי תקשורת RF נישאים/ניידים כוללים: מכשירי ניטור לתינוקות, אזניות Bluetooth וגלי RIDF ואלה מתכוון המוחזקים בידי הנמצאים תכופות בשימוש בסריקות בטיחוניות.

סמלים באפליקציה Eversense CGM

סמל	הסבר
	Glucose Alert (התרעה על סוכר) מופיע כאשר רמת הסוכר נמצאת מעל לטווח התתרעה עבור רמת הסוכר הגבוהה ומתחת לטווח התתרעה עבור רמת הסוכר הנמוכה. הסמל מופיע במסך ALERT HISTORY (ההיסטוריה התträעתות).
	התרעה חייזי נמוכה או התרעה נפילת שיעור מצין שהתרעת חייזי נמוכה או התרעת נפילת שיעור התרחשה. הסמל מופיע במסך ALERT HISTORY (ההיסטוריה התträעתות) ועל גבי קו המגמה במסך הבית.
	התרעה חייזי גבוהה או התרעת עליית שיעור מצין שהתרעת חייזי גבוהה או התרעת עליית שיעור התרחשה. הסמל מופיע במסך ALERT HISTORY (ההיסטוריה התträעתות) ועל גבי קו המגמה במסך הבית.
	Empty Battery Alert (התרעה סוללה ריקה) סמל זה מופיע כאשר סוללה המשדר החכם ריקה.
	Low Battery Alert (התרעה על סוללה חלשה) סמל זה מופיע כאשר רמת הטעינה של סוללה המשדר החכם טעונה בפחות מ-10%.
	Smart Transmitter/Sensor Alert (התרעה על משדר חכם/חישון) הסמל מופיע במסך ALERT HISTORY (ההיסטוריה התträעתות).
	Smart Transmitter/Sensor Notifications (הודעות על משדר חכם/חישון) סמל זה מופיע כאשר מוצגות הודעות הקשורות למשדר החכם או לחישון.
	Calibration Alert (התרעת כיוול) סמל זה מופיע כאשר ישן התראות הקשורות לכיוול.
	Calibration Notification (הודעה על כיוול) מופיע במסך ALERT HISTORY (ההיסטוריה התträעתות) כאשר ישן הודעות הקשורות לכיוול. הסמל גם מופיע בקו המגמה של הסוכר שי ובוימן האירועים כאשר מתבצעת הזרת BG ידנית.

סמלים באפליקציה Eversense CGM (המשך)

סמל	הסבר
	הcoil התקבל מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וב-LOG EVENT (יומן האירועים) כאשר כoil מסוים מזון ונתפרק.
	מתבצע כoil מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וב-יומן האירועים במהלך כ-15 דקות בהן מתבצע הכoil. הסמל יכול להופיע לאדם, שחור או כחול כאשר כבר לא מתבצע הכoil.
	coil לא הושלם מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וב-יומן האירועים כאשר לא נאספו מספיק נתונים על מנת להשלים את הכoil. לדוגמה, כאשר המשדר מוסר מעלה לחישון במהלך כ-15 דקות בהן מתבצע הכoil.
	לא ניתן להשתמש בכoil מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וב-יומן האירועים כאשר כoil מסוים מזון אך לא ניתן להשתמש בו. לדוגמה, הערך המזון נמוך מ-40 מ"ג/ד"ל או גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל. במקרה זה, ערך הכoil מאוחסן כהשנת BG ידנית.
	חיבור מערכת מוצלח סמל זה מופיע כאשר המשדר מתחבר אל הטלפון החכם והחישון מקשר למשדר החכם. הקווים מצינים את חזק החיבור.
	חיבור משדר וחישון מופיע לפני שהמשדר מחובר אל חישון וכאשר החיבור בין משדר לחישון נקטע.
	חיבור משדר ואפליקציה ניידת מופיע כאשר חיבור ה-BLE בין המשדר והאפליקציה נקטע.

סמלים באפליקציה Eversense CGM (המשך)

סמל	הסבר
	התראות מרובות (יותר מהתראת אחת או אירוע אחד) סמל זה מופיע כאשר מוצגים שני אירועים או התראות או יותר במרוחק זמן קצר.
	סמל אירוע מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וב- EVENT LOG (יומן האירועים) לאחר הזמן אירוע. האירועים אותם ניתן להציג הם: סוכר אינסולין ארוחות בריאות
	פרופיל זמני סמל זה מופיע כאשר הפרופיל הזמני פועל.
	מצב 'נא לא להפיע' (DND) סמל זה מופיע כאשר הדגרת ה-DND פעילה.

סמלים על אריזות ומכשירים

סמל	הסבר	סמל	הסבר
	מ"ט		מספר סידורי
	חלק מיושם סוג BF		קרינה אלקטرومגנטית בלתי מיננטת
	מיוצר ללא גומי לטקס טבעי		מזהה FCC מוצמד לכל המכשירים הcpfifs לאישור
	לא סטרילי		עין במסמכים הנלוויים
	זהירות, עין במסמכים הנלוויים		בשימוש על ידי
	ישראל		תאריך יצור
	הגבלות טמפרטורות אחסון		מספר קבוצת פריטים
	אפיק טורי אוניברסלי (USB)		

סמלים על אריזות ומכשירים (המשך)

הסבר	סמל	הסבר	סמל
אין להשתמש אם האריזה פגומה		קיימות התווויות נגד להדמיה בתהודה מגנטית (MRI) עם המשדר החכם	
עוקר באמצעות אטילן אוקסיד		תלי MR. עצם אשר הוכח כבטוח בסביבת MR בתנאים המוגדרים הכלולים תנאים עבור השדרה המגנטיי הסטטי, השדרות המגנטיים המודורגים על פי זמן שודות תדריות הרדיו. למידע מלא יש לעיין בסעיף מידע בטיחות ל-MRI.	
מחסום עיקור יחיד: עוקר באמצעות אטילן אוקסיד			
חוקי ארה"ב (פדרליים) מגבילים את המכירה של מערכת Eversense E3 CGM למטריה על ידי או בהזמנת רופא			
עקבו אחר ההוראות לשימוש		הנחיית האיחוד האירופי 2012/19/EU WEEE	
הסימן מאשר שהמכשיר עומד בתקנות התקנים הרפואיים 2017/745		מיועד לשימושו של מטופל יחיד	
התקן רפואי (හුරාහු: בכרטיזן השתל, דבר זה מצין את שם התקן)		אין לעקר מחדש	
מזהה התקן ייחודי			

סמלים על אריזות ומכשירים (המשך)

סמל	הסביר	סמל	הסביר
	מידע בנווגע למחזר		תאሪיר החדרה
	מפיק		מרכז רפואי להשתלות או רופא
	אתר המידע של המטופל		יבואן
	נצח מורשה בקהילה האירופית		עובד מטופל אחד לשימוש חוזר
	מכיל חומרים רפואיים		

1. אחריות מוגבלת עברו משדר החכם Eversense E3

1.1. כיסוי ומישר אחריות מוגבלת.

Senseonics Incorporated ("Senseonics") מספקת אחריות למטופל המקור משתמש הקצה ("אתה") של המשדר החכם של E3 ("המשדר החכם") כך שהמשדר החכם יהיה נקי מפגמים בחומרים ומימוננות תחת תנאי שימוש נורמליים לתקופה של שנה אחת (365 ימים) המתחילה בתאריך בו קיבלת הראשונים את המשדר החכם מהוצאות הרפואית שller ("תקופת האחריות המוגבלת"). אחריות זו נותנת לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שתהיה לך גם זכויות אחרות אשר שונות מסוימת משפטית אחת לשניה. אחריות מוגבלת זו נכנסת לתוקפה בתנאי שאתה מספק ל-Senseonics בכתיב על כל פגם בחומרים ו/או במימוננות מוגבלת זו נכנסת לתוקפה בתנאי שאתה מספק ל-Senseonics קובעת שבתביעה התקבלה בשל פגמים מקוריים בחומרים ולאחר איתורם, ובכפוף לעובדה ש-Senseonics מספקת לך משדר החכם החלופי בהתאם להוראות אחריות מוגבלת זו, כל אחריות שנותרה מן המשדר החכם המקורי תעבור למחליף המשדר החכם, כאשר סיום תקופת האחריות עבר המשדר החכם החלופי יהיה ביום השנה שבו קיבלת לראשונה את המשדר החכם שלך מהוצאות הרפואית שלך, והאחריות תסתירם בהתאם לאחריות המשדר החכם המקורי.

2. החרגות לאחריות מוגבלת.

האחריות המוגבלת מתיחסת רק למשדרים חכמים המיוצרים על ידי Senseonics, והוא מותנה בשימוש מתאים של המוצר על ידך. האחריות המוגבלת אינה מכסה א) נזקים קוסמיים, שריטות או נזקים אחרים למשתחים וחלקים חשופים בשל שימוש נורמלי; ב) נזקים בתוצאה מתאונות, הזנחה או כל רשלנות אחרת, שימוש לא נכון, לחץ פיזי, חשמלי או אלקטומגנטי לא רגאל, או כל שינוי בכל חלק של המוצר; ג) ציוד אשר שונה או הוסר, אשר מספר הזיהוי שלו שונה או הפרק ללא קリア בכל דרך אחרת; ד) פגמים כתוצאה שימוש בלבדות; ו) ציוד אשר פורק;-; ז) נזקים כתוצאה מהפעלה, בדיקות, תחזוקה, התקינה או כיוןיהם לא מתאימים. המשדר החכם עמיד למים על פי המפרטים המופיעים במדריך למשתמש. אחריות מוגבלת זו אינה מכסה נזקי מים אם כיiso המשדר החכם נסדק, או בעל נזק כלשהו. אחריות מוגבלת זו לא תישם עבור שירותים צדדיים, ציוד או תכונה אשר יכולם להיות בשימוש בלבד עם המשדר החכם.

3. חובותיה של Senseonics תחת אחריות מוגבלת זו.

התרופה היחידה והבלתיית שלך, והחובה היחידה והבלתיית של Senseonics תחת אחריות מוגבלת זו היא לתקן או להחליף, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל תשלום נוסף מצדך, כל משדר חכם פגום, בתנאי שהפגם מתרחש וتبיעו תקופה מתකבת על ידי Senseonics בתקופת האחריות המוגבלת. עליך להחזיר את המשדר החכם הפגם למחלקה שירות לקוות מורשת של Senseonics בחבילת משלוח מתאימה אשר תגונן כהלכה על המשדר החכם מפני כל מזק נוסף, בלבד עם השם והכתובת שלך, השם והכתובת של הוצאות הרפואית ממנה קיבלת את המשדר החכם, התאריך ומספר הדיזיין של המשדר החכם. כדי לברר להיכן לשולח את המשדר החכם, אנה בקר באתר שלנו <https://global.eversensediabetes.com>. בעת הקבלה, אם Senseonics מחייבת שהמשדר החכם מכוסה על ידי האחריות המוגבלת והכייסטי לא נדחה, סבב <https://global.eversensediabetes.com> מיד את המשדר החכם. אם Senseonics מחייבת שהמשדר החכם אינו מכוסה על ידי האחריות המוגבלת, אתה יכול לרכוש תחליף או אם אתה רוצה רוץ מה مصدر החכם המקורי יוחזר אליו, עליך לשאת בכל הוצאות המשולח מראש.

משדר חכם אשר תוקן או הוחלף מקבל על עצמו את תקופת האחריות שנותרה מן המשדר החכם המקורי, או [30] ימים ממועד תיקון או ההחלפה, הארכואה מבינהן.

4. הגבלות לחובות Senseonics תחת האחריות המוגבלת.

האחריות המוגבלת של SENSEONICS המתוארת לעיל היא בלעדית ובאה במקום כל אחריות אחרת, ברורה או מרומצת, הן למעשה או על פי פעולה החוק, סטטוטורית או אחרת, ו-SENSIONICS מDIRA ומווערטת באופן מפורש על כל אחריות אחרות, כולל אך לא רק, כל אחריות מרומצת או תנאי סחרות מסוים, אחריות התאמת למטרה מסויימת, אחריות נגד הפרה, אחריות איקות מספקת, אחריות אי-הפרעה, אחריות לדיקוק או תוכן המכיל מידע, או כל אחריות העולה מהתהילה העסקה, מן החוק, גהיל' השימוש או המשחר. למעט עד למידה האסורה על ידי החוקים הרלוונטיים, SENSEONICS לא תהיה אחראית לכל נזק מיוחד, מקרי, תוצאות או בלתי ישיר, באם כתוצאה מכל תאריה של חובה, העולה בכל דרך מן המכירה, השימוש, או כל שימוש אלא כאמור, או חוסר יכולת להשתמש במסדרים החכמים או בכל מערכת אחרת EVERSENSE E3. הגבלה זו תהיה בתוקפה גם אם SENSEONICS סוכנה ידועה בענוג לעזקים הנ"ל ולמרות כל כישלון של המטרה העיקרית של תרופה מוגבלת זו. אחריות מוגבלת זו לא תורחט לאחר מלבדך, משתמש הקצה המקורי או לא של מוצר זה והיא מצהירה על התרופה הבלעדית עבורה. אם כל חלק באחריות מוגבלת זו אינו חוקי או לא

ניתן לאכיפה מכל סיבה בחוק, עד למידה בה SENSEONICS לא תוכל, בהתאם לחוק הרלוונטי, לוותר על כל אחריות מרומצת או להגביל את חובותיה, ההייוף והתקופה של כל אחריות שכזו וההרחבה של אחריות SENSEONICS יהו במידה המינימלית המורשית על ידי החוק הרלוונטי הנ"ל.

הודעות משפטיות

הודעה משפטית מטעם Apple

”מיוצר עבור iPod touch”, ”מיוצר עבור אייפון” ו-”מיוצר עבור אייפד” פירושם שאביזר חשמלי עוצב על מנת להתחבר באופן ספציפי לא iPod touch, אייפון או אייפד, בהתאם, והוא אושר על ידי המפתח על מנת להתאים לתקני הביצועים של Apple. Apple לא תהיה אחראית לפעולה של המכשיר או ל贓ות המכשיר לתקני הבטיחות והתקנים המומוסטים הרלוונטיים. אני שים לב שהשימוש באביזר זה ביחיד עם iPod touch עם אייפון או אייפד יכול להשפיע על הביצוע האלחותי.

Apple, אייפון, אייפד, אייפוד ו-iPod touch הם סימנים מסחריים של Inc Apple,. הרשמיים בארה"ב ובמדינות אחרות.

הודעה משפטית מטעם Google

השם ”안드로이יד” הלוגו אנדרואיד ו-Google Play הם סימנים מסחריים של Inc Google.

אודות® Bluetooth

Bluetooth® הוא סוג של תקשורת אלחוטית (RF). מכשירים ניידים כגון טלפונים חכמים עושים שימוש בטכנולוגיית Bluetooth® כמו גם מכשירים רבים נוספים. המשדר החכם שלך עשוה שימוש ב-Bluetooth® Smart על מנת להתחבר אל המכשיר הנייד ולשלוח את התוצאות אל האפליקציה.

סימן מסחרי® Bluetooth

סימן המילה® Bluetooth והלוגו הם בבעלותה של Inc SIG Bluetooth® וכל שימוש של סימנים אלו על ידי Senseonics, Inc. נמצא תחת רישיון.

FCC מידע

ה مصدر החכם שלך מצוי ב חלק 15 של חוק FCC. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים:
(1) למכשיר אסור לגרום להפרעות מזיקות.

(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעה שעלול לגרום לפעולה לא רצiosa.

שינויים או התאמות אשר לא אושרו באופן מפורש על ידי Senseonics, Inc, יכולים לפגום בסמכות המשמש להפעיל את החכם.

קוויים מנחים אלו עשויים להבטיח שה مصدر החכם שלך לא יפריע לפעולות של התקנים חשמליים אחרים הנמצאים סמוך אליו. בנוסף, התקנים חשמליים אחרים לא צריכים להפריע לפעולות של המصدر החכם.

למעט המכשיר הנידש שלך, התקנים חשמליים אחרים הפעילים בסמוך ל مصدر החכם, כגון טלפונים ניידים, תנוריו מיקרוגל או רשת אלחוטית, עלולים למנוע או לדחות את העברת הנתונים מן המصدر החכם שלך אל האפליקציה. כדי לחדש את התקשרות, התרחק ממכשירים אלקטרוניים אלה או כבה אותן.

ה مصدر החכם נבחן ונמצא מתאימים לשימוש ביתי. ברוב המקרים, הוא אינו אמור להפריע לפעולות מכשירי חשמל אחרים הנמצאים בביתם אם השתמש בו נכון ונטולת הוראות. עם זאת, مصدر החכם זה מייצר אנרגיה תדר רדיו. אם נעשה בו שימוש לא מתאים, המصدر החכם שלך עלול להפריע לפעולות הטלויזיה, הרדיו או פועלות התקנים חשמליים אחרים בבתך אשר מקבלים או משדרים אותן.

אם תיתקל בעבויות הקשורות להפרעות ל مصدر החכם, נסה להתרחק מקורות ההפרעה. תוכל גם להעביר את המכשיר האלקטרוני או האנטנה שלו למיקום אחר כדי לפטור את הבעיה.
אם תמשיך להיתקל בהפרעות, פנה לשירות לקוחות של יצרן המכשיר האלקטרוני שגורם להפרעה.

הנחיית ציוד רדיו

מצהירה שצד רדיו מסווג ל مصدر חכם Eversense E3 הוא בהתאם להנחייה Eversense, Inc. EU/2014/53 בטקסט המלא של הצהרת התאימות האירופית זמין בכתבوبة האינטרנט הבאה:
<https://global.eversensediabetes.com/declarationofconformity>

אינדקס

תקשורת RF	
תדרות רדיו	232
יציאה, USB	23
usb, כבל	23

הערות

הערות

:Basic UDI/DI

- 081749102FG3500T8 - Eversense E3 -
081749102FG6400TQ - Eversense E3 -
081749102FG6501TX - Eversense -
081749102FG5101T4 :iOS - Eversense -
081749102FG5301TE - Eversense -

שם הרישום באם"ר:

מערכת לניטור סוכר רצף
Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring System
מספר רישום: 2660816

שם הייצן וכתובתו: סנסאוניקס , אינק. סנקה מדוויס
פאראקיי, 20451, ג'רמנטאון, מרילנד 20876-7005, ארה"ב

פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיק בישראל:

ד"ן דיאגנוטיקה בע"מ
רחוב האשל 7, פארק תעשייה דרום קיסריה, 3079504
04-6175390
patient.care@dyn.co.il

התקשר אל 04-6175390 עבור שירות לקוחות.



20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA


global.eversensediabetes.com

פטנטים:

www.senseonics.com/products/patents

Senseonics[®]



(241) LBL-4202-43-001_REV_E

