


eversense<sup>E3</sup>

## מדריך למשתמש

מדריך שימוש עבור Eversense E3  
מערכת לניטור סוכר רציף

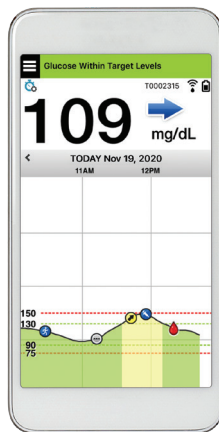

אפליקציה למובייל



מסדר חכם



חיישן





## **סימן מסחרי E3 Eversense**

Eversense E3, Eversense E3 ניטור סוכר רציף, Eversense E3 CGM, Eversense E3 חיישן, Eversense E3 משדר חכם, Eversense E3 אפליקציה ולוגו Eversense E3 הם סימנים מסחריים של Senseonics, Incorporated. מותגים אחרים והמוצרים שלהם הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של בעליהם החוקיים.

	רשימת מונחים.....	6
28	1. מבוא.....	9
35	עזרה ותמיכה	9
	מרכיבי המערכת Eversense E3 CGM	10
36	4. קישור החיישן.....	9
	דרישות המערכת	10
42	5. נשיאת משדר יומית.....	13
	הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות	13
43	שימוש יומיומי	14
44	הצמדת המשדר החכם לחיישן שהוחדר	14
47	הפעל וכבה את המשדר החכם	14
48	טיפול ותחזוקת המשדר החכם	14
48	מחוון סוללה	14
49	מחווני מצב נוריות חיווי	15
50	6. כיול המערכת.....	16
	מה כלול בחבילה זו	16
52	שלבי כיול	16
55	אופן הכיול	16
59	7. השימוש באפליקציה.....	17
	2. הטבות וסיכונים.....	19
60	ניהול חשבון Eversense	19
61	בדוק את הגדרות המכשיר הנייד שלך	20
62	הכרת מסך "My Glucose" (הסוכר שלי)	22
65	חצי מגמה	22
66	להבין את החלטות הטיפול עם ה-CGM	24
68	שוחח עם הצוות הרפואי שלך	25
	3. תחילת השימוש.....	27
	הטען את המשדר החכם שלך	27
	שלב 1. הורד והתקן את האפליקציה	27

142	בריאות	70	ביצוע של החלטות טיפול עם Eversense E3
143	פעילות גופנית	72	חיצו מגמה של Eversense E3 והחלטות טיפול
144	<b>11. דוחות</b>	74	מה תעשה
145	סיכום מודלי שבועי	78	גרף מגמה
146	סטטיסטיקות סוכר	79	אפשרויות תפריט
146	תרשים עוגה עבור הסוכר.		
147	<b>12. שיתוף נתונים</b>	80	<b>8. התאמה אישית של ההגדרות שלך</b>
	תכנית Data Management Software (DMS) של Eversense	82	הגדרה של רמות התרעות עבור רמות סוכר
147	שתף את הנתונים שלי	84	הגדרה של רמות יעד עבור רמות סוכר
147	סנכרון	86	הגדרת התרעות חיזוי
148	המעגל שלי	88	הגדרה של התרעות עבור קצב שינוי
149	שיתוף אפליקציה	90	הגדרה של תזכורות כיוול יומיות
150		91	הגדרת מידע אודות המערכת
	<b>13. מידע מוצר ומידע כללי</b>	92	קישור מחדש של חיישן
151	<b>בתוך האפליקציה</b>	94	הגדרת צלילים
152	תמונת פרופיל	95	הגדרת מעקף לסוכר נמוך
154	יציאה מן המערכת	101	הגדרת ניתוק משדר
	<b>14. לראות נתוני Eversense E3 על גבי שעון ה-Apple</b>	104	הגדרת פרופיל זמני
155	התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple	107	<b>9. תיאורי התרעות</b>
158		109	Alert History (היסטוריית התרעות)
	<b>15. המעגל שלי</b>	111	תיאורי התרעות ופעולות
178	ניטור מרחוק באמצעות מערכת Eversense	137	<b>10. יומן אירועים</b>
178	E3 CGM ו-Appliקציית Eversense NOW	139	סוכר
		140	ארוחות
		141	אינסולין

220	..... 20. נתונים טכניים	184	..... 16. אודות החיישן
220	חיישן	185	שלבי החדרה
221	מסדר חכם	186	שלבי הסרה
222	מקור מתח ומטען	187	..... 17. נסיעות
222	כבל USB לטעינה והורדת נתונים	188	..... 18. איתור וטיפול בבעיות
223	תקנים חשמליים ותקני בטיחות	188	מסדר חכם
226	סמלים באפליקציה Eversense CGM	190	סוללת המסדר החכם וטעינה
229	סמלים על אריזות ומכשירים	191	החיבור עם המסדר החכם
	Eversense E3 אחריות מוגבלת עבור	194	כיול
232	מסדר החכם	196	התרעות והודעות
235	..... Eversense DMS 21	198	קריאות סוכר
235	מבוא	199	קבלה של החלטות טיפול
236	תחילת השימוש	200	האפליקציה
250	דוחות נוספים	200	חצי מגמה
267	Settings (הגדרות)	202	חיישן
267	סוכר	204	סנכרון
271	העלאת נתוני מכשיר	204	אירועים
278	Data Share (שיתוף נתונים)	205	קיצורי דרך
278	שיתוף נתונים עם המרפאה שלך	206	..... 19. ביצוע ההתקן
281	Help (עזרה)	206	ביצוע מחקר קליני
283	..... Eversense NOW 22	208	דיוק Eversense E3 אל YSI
	ניטור מרחוק באמצעות מערכת Eversense	218	במחקר PROMISE
283	CGM ואפליקציית Eversense NOW	218	חיי החיישן
286	שימוש באפליקציית Eversense NOW	219	בטיחות
288	הצטרפות ל-Eversense Circle		

290	הזמנות למעגלים
294	תפריט ראשי
296	צפייה בנתוני CGM

## 307..... הודעות משפטיות

307	הודעה משפטית מטעם Apple
307	הודעה משפטית מטעם Google
307	אודות Bluetooth®
307	סימן מסחרי Bluetooth®
308	מידע FCC
308	הנחיית ציוד רדיו

## 309 ..... אינדקס

# רשימת מונחים

**CT** טומוגרפיה ממוחשבת

**מצב 'נא לא להפריע' (DND) באפליקציית**

**Eversense** כאשר פעיל, האפליקציה תפסיק להציג התרעות שאינן קריטיות, והמסדר החכם יפסיק לספק הודעות רטט עבור התרעות שאינן קריטיות. התרעות קריטיות תמשכנה להגיע. למספר רב של מכשירים ניידים ישנו מצב 'נא לא להפריע' נפרד. למידע נוסף, עיין בהוראות היצרן.

**הפרעה אלקטרומגנטית** שדה אנרגיה חזק המיוצר על ידי מכשירים חשמליים או מגנטיים.

**EULA** הסכם רישיון עבור משתמש קצה

**אפליקציית Eversense** תוכנה שמוקנת במכשיר נייד ומשמשת להצגת נתוני סוכר CGM הנשלחים מהמסדר החכם.

**אפליקציית הלקוח של Eversense** אפליקציית מחשב המאפשרת למשתמשי Eversense להעלות את הנתונים הקיימים על גבי המסדר החכם שלהם אל המערכת לניהול נתונים על ידי שימוש בכבל USB.

**מערכת ניהול הנתונים של Eversense (DMS)** אפליקציה מבוססת אינטרנט התואמת לאפליקציית Eversense שבה נתוני הסוכר מאוחסנים וניתנים לצפייה.

**Eversense NOW** אפליקציית ניטור מרחוק המאפשרת לך לשתף את נתוני הסוכר שלך עם אנשים אחרים.

**התרעה** התרעה מזהירה שקיים מצב שדורש את תשומת לבך ושעליך להגיב/לנקוט בפעולה מתאימה.

**סנכרון אוטומטי** כאשר תכונה זו מופעלת באפליקציית Eversense עבור המכשיר הנייד, נתוני הסוכר וההגדרות שלך יסונכרו עם ה-Eversense DMS בכל שעותיים.

**סוכר בדם** ערך הסוכר שהושג מבדיקת סוכר באצבע.

**מד סוכר בדם** מכשיר הזמין באופן מסחרי המשמש למדידת רמת הסוכר על ידי שימוש בדגימת דם מהאצבע.

**Bluetooth®** שם מותג עבור טכנולוגיית רשתות אלחוטית העושה שימוש בתדרי רדיו בעלי גלים קצרים (RF) על מנת לחבר מכשירים ניידים ומכשירים אלקטרוניים אלחוטיים אחרים.

**כיול** קריאת רמת סוכר בדם מהאצבע מוזנת אל תוך אפליקציית Eversense על מנת לבדוק את דיוק המערכת. עם מערכת ה-Eversense E3, ישנם שני שלבים: שלב האתחול שבמהלכו יש לבצע 4 דגימות דם מהאצבע, ושלב הכיול היומי, שבמהלכו נדרשת דגימת דם מהאצבע פעם או פעמיים ביום.

**CGM** ניטור סוכר רציף. ניטור רציף של רמות הסוכר מהנוזל הבין-תאי מדי כמה דקות.

**התוויות נגד** מצבים או נסיבות בהם אדם איננו יכול להשתמש במכשיר.

## FAQ שאלות נפוצות

**צוות רפואי** צוות רפואי מקצועי ומוסמך אשר השלים בהצלחה את תוכנית ההכשרה בנושא החדרה והסרה של Eversense E3 CGM ואשר קרא והבין את הוראות ההחדרה וההסרה של Eversense E3 CGM. חיישן Eversense E3 CGM.

**קריאת "HI"** מציינת שקריאת הסוכר של החיישן היא < 400 מ"ג/ד"ל.

**היפרגליקמיה** מצב שבו רמת הסוכר בדם גבוהה.

**היפוגליקמיה** מצב שבו רמת הסוכר בדם נמוכה. **נוזל בין-תאי (ISF)** הנוזל הנמצא בין תאי הגוף. ה-Eversense E3 CGM מודד את רמת הסוכר מנוזל בין-תאי, בניגוד לרמת הסוכר בדם המושגת באמצעות בדיקת דם מהאצבע.

**מכשיר פרוץ** מכשיר (אייפון או אייפוד) אשר שונה על מנת להסיר את הבקורות וההגבלות של היצרן המקורי.

**לד** דיודה פולטת אור

**חיישן מקושר** חיישן המחובר למשדר חכם.

**קריאת "LO"** מראה שקריאת חיישן סוכר היא > 40 מ"ג/ד"ל.

**מכשיר נייד** מכשיר נישא המבוסס על מערכת הפעלה למכשירים ניידים שמפעילה את אפליקציית Eversense ומנהלת תקשורת עם המשדר החכם.

**מ"ג/ד"ל** מיליגרמים לדציליטר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית. בחלק מן המדינות, כולל בארצות הברית, תוצאות בדיקות הסוכר מדווחות ב-מ"ג/ד"ל, דבר המראה את רמת הסוכר בדם כאשר נעשה שימוש במד סוכר בדם, או את רמת הסוכר בנוזל בין-תאי כאשר נעשה שימוש בכמה מערכות CGM, כגון מערכת ה-Eversense E3 CGM.

**ממו"ל/ל"ל** אלפיות מול לליטר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית ממו"ל/ל" - מילימולים לליטר, טר, יחידת מידה המראה ריכוז חומר מסוים בכמות נוזלים ספציפית. בהרבה מן המדינות, תוצאות בדיקות הסוכר מדווחות ב-ממו"ל/ל", דבר המראה את רמת הסוכר בדם כאשר נעשה שימוש במד סוכר בדם, או את רמת הסוכר בנוזל בין-תאי כאשר נעשה שימוש בכמה מערכות CGM, כגון מערכת ה-Eversense E3 CGM.

**MRI** דימות תהודה מגנטית

**תלוי MR** עצם אשר הוכח כבטוח בסביבת MR בתנאים המוגדרים הכוללים תנאים עבור השדה המגנטי הסטטי, השדות המגנטיים המדורגים על פי זמן ושדות תדירות הרדיו.

**קצב שינוי/חיצי מגמה** מציינים את הכיוון ואת מהירות השינוי של רמות הסוכר שלך.

**ניטור מרחוק** תכונה אופציונלית המאפשרת לך להזמין אחרים לראות את נתוני ה-CGM שלך על ידי שימוש ב-Eversense NOW, אפליקציה נפרדת למכשירים ניידים שאותה עליהם להוריד למכשיר נייד תואם.

**חיישן** התקן המוחדר מתחת לעור עבור מדידה רציפה של רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי.

**סוכר חיישן** ערך הסוכר שהושג מחיישן Eversense.

**הגדרת נמנום** משמשת להגדרת תדירות החזרה של התרעה.

**תת-עורי** ממוקם מתחת לעור.

**משדר חכם** מכשיר לשימוש רב-פעמי שנישא באופן חיצוני מעל החיישן המוחדר, מפעיל את החיישן ושולח את נתוני הסוכר למכשיר נייד לתצוגה באפליקציית Eversense.

**שלב החימום** פרק הזמן הנדרש לכוונון החיישן לאחר שהוחדר ולפני הכיולים.

# 1. מבוא

חלק זה מפרט את אופן השימוש במדריך זה ומתאר את מערכת Eversense E3 CGM החדשה שברשותך, כולל הרכיבים הכלולים ומטרת השימוש בה.

ברכותינו על קבלת טכנולוגיית Eversense E3 CGM שתייע לך בניהול הסוכרת. מערכת ה-Eversense E3 CGM שלך מיועדת למדידה של רמות הסוכר עד ל-180 ימים לאחר החדרת החיישן שלך. מידע בנוגע לרמות הסוכר הנאסף על ידי המערכת נשלח באופן אוטומטי למכשיר הנייד שלך. עליך לפנות לרופא שלך לקביעת מועד להחזרה והסרה של החיישן.

## עזרה ותמיכה

אנא עיין במדריך זה למשתמש ביחד עם ספק שירותי הבריאות שלך. למידע נוסף ואיתור וטיפול בבעיות הנוגעות למוצר Eversense E3, צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בטלפון (844-736-7348) 844-SENSE4U. אם אתה נמצא מחוץ לארה"ב, צור קשר עם המפיץ המקומי או בקר באתר <https://global.eversenseddiabetes.com> על מנת לראות מיהו המפיץ המקומי באזורך. על מנת לעיין בגרסה העדכנית ביותר של המדריך למשתמש, בקר בכתובת <https://global.eversenseddiabetes.com>.

## מרכיבי המערכת Eversense E3 CGM

המערכת מכילה (1) חיישן קטן המוחדר אל מתחת לעור על ידי צוות רפואי מוסמך (2) משדר חכם הניתן להסרה הממוקם מעל לחיישן, וכן (3) אפליקציה למכשירים ניידים שבה מוצגת קריאות הסוכר.



חיישן



משדר חכם

### Eversense E3 חיישן

החיישן מוחדר מתחת לעור (בחלק העליון של הזרוע) ומודד את הסוכר בנוזל הבין-תאי לתקופה של עד 180 ימים. רמות הסוכר מחושבות לאחר מכן על ידי המשדר החכם ונשלחות לאפליקציה.

### Eversense E3 משדר חכם


המשדר החכם הנשלף מולבש באופן חיצוני מעל החיישן ומפעיל אותו. הוא שולח נתוני סוכר באופן אלחוטי (דרך Bluetooth) לאפליקציה המותקנת במכשיר הנייד שלך. המשדר החכם מספק גם התרעות רטט על הגוף המבוססות על הגדרות רמות הסוכר אותן תבחר. למשדר ישנה סוללה הניתנת לטעינה וניתן להשתמש בו לתקופה של עד שנה אחת.

## אפליקציית Eversense

אפליקציית Eversense היא תוכנה שפועלת במכשיר נייד (לדוגמה, טלפון חכם או טאבלט) ומציגה נתוני סוכר במגוון דרכים. היא מספקת גם התרעות המבוססות על הגדרות הסוכר שתבחר.



אנדרואיד

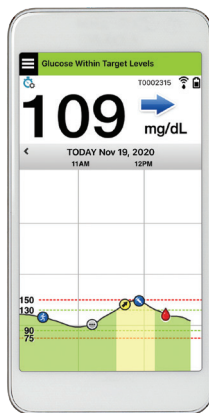

iOS

פריסת המסכים של אפליקציית Eversense תשתנה בהתבסס על הדגם ו/או מערכת ההפעלה של המכשיר הנייד שלך. בתוך מדריך זה למשתמש הכללנו כמה דוגמאות להבדלים אלו.

**וודא שהמכשיר החכם שלך עושה שימוש במערכת ההפעלה העדכנית ביותר אשר**

**רשומה כתואמת באתר שלנו**

<https://global.eversensedidiabetes.com/compatibility>

**חשוב:** על מנת להשתמש במערכת ה-Eversense E3 CGM, עליך להיות בעל הבנה בנושא של הורדה ושימוש באפליקציות למכשירים ניידים במכשיר הנייד שלך. נתונים מן המשדר החכם ה-Eversense E3 נשלחים באופן אלחוטי דרך Bluetooth. קרא בעיון את ההוראות במדריך למשתמש להורדה והתקנה של אפליקציית Eversense למכשירים ניידים ולשיוך המכשיר הנייד למשדר החכם. אם ישנו משהו שאינך מבין במדריך זה למשתמש, אנא צור קשר עם המפיץ המקומי שלך.

המערכת כוללת גם מדבקות לשימוש יומי, ואלו תסופקנה לך על ידי ספק שירותי הבריאות המקומי שלך לאחר החדרת החיישן. למדבקות ישנו צד נצמד אקרילי אשר נצמד אל החלק האחורי של המשדר החכם, וצד נצמד מסיליקון הנצמד אל העור.

## מבט כללי על מערכת ה-E3 Eversense

מערכת נפרדת לניטור הסוכר בדם (אשר איננה מסופקת על ידי Senseonics) נדרשת על מנת לכייל את מערכת ה-CGM ועל מנת לקחת החלטות בנוגע לטיפול תחת תנאים מסוימים. ראה להבין את החלטות הטיפול עם ה-CGM. כאשר נעשה בהם שימוש נכון, מרכיבים אלו עובדים ביחד על מנת להבטיח שהיה לך ניטור רציף של רמות הסוכר שלך לתקופה של עד 180 ימים.

כדי להבטיח קבלת קריאות סוכר רציפות ומידע נוסף, פעל בהתאם לעצות אלה לשימוש יומי:

- ✓ לבש את המשדר החכם שלך בכל זמן, למעט בעת הטעינה.
- ✓ המשדר החכם עמיד למים בעומק של עד מטר אחד (3.2 רגל), למשך 30 דקות. חשיפה של המשדר החכם לתנאים מעבר לאלו שצוינו, תזיק לו ותגרום לך לאבד את האחריות שלו.
- ✓ ודא שלמשדר החכם יש מספיק מתח סוללה כל הזמן.
- ✓ בצע שתי בדיקות כיוול בעזרת מד סוכר בדם בכל יום כאשר תתבקש לעשות זאת.
- ✓ שים לב להתראות והודעות אשר תקבל מן המשדר החכם שלך ומהמכשיר הנייד.
- ✓ החלף את המדבקה על גבי המשדר החכם שלך בכל יום.
- ✓ ניתן להסיר את המשדר החכם מן החלק העליון של הזרוע בכל עת, אך לא בזמן הכיול. זכור שלא נאספים נתונים כאשר המשדר החכם איננו מתקשר עם החיישן. כאשר אתה מניח את צידו האחורי של המשדר החכם שלך על גבי מיקום החיישן, תידרשנה עד ל-10 דקות על מנת שהמשדר החכם יתקשר עם החיישן, ושקריאות תתחלנה להופיע באפליקציה.
- ✓ כאשר המשדר החכם והמכשיר הנייד לא נמצאים בטווח מתאים אחד מהשני, הנתונים הנאספים על-ידי המשדר החכם מאוחסנים ונשלחים לאפליקציה כאשר המכשיר הנייד והמשדר החכם ימצאו שוב באותו טווח.
- ✓ ניתן לשאת בבטחה את החיישן והמשדר החכם כאשר עוברים דרך גלאי מתכת בשדות תעופה. בזמן טיסה, המשדר החכם יתנהג בדומה לכל מכשיר Bluetooth אחר. הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות הספציפיות שקבעה חברת התעופה.

הנה כמה מהתכונות של מערכת Eversense E3 CGM:

- תקשורת אלחוטית עם החיישן, המשדר החכם והאפליקציה.
- שימוש בחיישן לזמן ארוך על ידי החדרתו לחלק העליון של הזרוע לתקופה של עד 180 ימים.
- הצגת התרעות בהגעה לרמות התרעה על סוכר נמוך או גבוה מוגדרות מראש (היפוגליקמיה או היפרגליקמיה).
- התרעות מנבאות מאפשרות לך לדעת מראש **לפני** שתגיע לרמות התרעה על סוכר נמוך או גבוה מוגדרות מראש
- שימוש במכשיר נייד (כגון טלפון חכם) להצגת קריאות רמות הסוכר.
- התרעות רטט על הגוף על ידי המשדר החכם, אפילו כאשר המכשיר הנייד איננו נמצא בטווח.
- מספקת קריאות בטווח 40 - 400 מ"ג/ד"ל כל 5 דקות.
- חצי מגמה המראים האם רמות הסוכר שלך עולות או יורדות והמהירות בה הן עושות זאת.
- גרפים ונתונים סטטיסטיים שמציגים את תוצאות הסוכר בעיצובים קלים להבנה.
- משדר חכם הניתן להסרה ולטעינה.
- יכולות הזנת אירועים (כגון ארוחות, פעילות גופנית ואינסולין).
- אחסון נתוני הסוכר באפליקציה ובמשדר החכם.
- מספקת יכולת ניטור רציף לאחרים על ידי שימוש באפליקציה Eversense NOW.

## דרישות המערכת

- מערכת Eversense E3 CGM.
- טלפון חכם תואם אנדרואיד או Apple iPhone® או iPod® או iPad® בעל Bluetooth Smart (או Bluetooth Low Energy).
- אפליקציית Eversense עובדת גם עם ה-Apple Watch®.
- עבור רשימת מכשירים מתאימים, אנא בקרו באתר <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.
- אפליקציית Eversense הורדה למכשיר הנייד שלך מ- Apple App Store או מ- Google Play™.

## הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות

השימוש באפליקציית Eversense כפוף לתנאים ולהתניות של הסכם הרישיון למשתמש קצה העדכני ביותר של אפליקציית Eversense ולמדיניות הפרטיות של אפליקציית Eversense. מסמכים אלו מעודכנים מעת לעת ומוצגים באתר <https://global.eversenseddiabetes.com>.

## מכשירים פרוצים

נא לא להשתמש באפליקציות Eversense על גבי אייפונים או אייפודים פרוצים. מכשירים פרוצים לא מספקים רמה קבילה של אבטחה עבור המשתמש ואינם מאושרים לשימוש על-ידי Senseonics.

## מסך או כפתור מקולקלים

אם המסך של המכשיר הנייד שבור או שהלחצנים אינם פועלים, ייתכן שלא תוכל להשתמש במערכת E3 Eversense ותחמיץ אירועי סוכר נמוך או גבוה.

## שינויי מכשיר

אין לשנות את מערכת ה-E3 CGM Eversense עבור שימוש עם מוצרים, אביזרים או ציוד היקפי אשר לא סופק או אושר בכתב על ידי Senseonics. שינויים לא מאושרים יבטלו את אחריות המשדר שלך והם יכולים להשפיע על ביצועי המערכת.

## התוויות לשימוש

מערכת E3 CGM Eversense מותווית למדידה רציפה של רמות הסוכר בנוזל במבוגרים (גיל 18 או מעל) עם סוכרת לתקופה של עד 180 ימים. מערכת זו מיועדת לשימוש בכדי להחליף מדידות רמות הסוכר בדם האצבע עבור החלטות טיפול הקשורות לסוכרת.

המערכת מיועדת:

- לספק קריאות סוכר בזמן אמת.
- לספק מידע על מגמת הסוכר.
- לספק התרעות לזיהוי וחיזוי של אפיזודות של רמה נמוכה של סוכר בדם (היפוגליקמיה) ורמה גבוהה של סוכר בדם (היפרגליקמיה).
- לסייע בניהול הסוכרת.

ניתן לפרש נתונים היסטוריים מן המערכת על מנת לעזור בהתאמת המשך הטיפול. התאמות אלה צריכות להתבסס על המגמות והדפוסים הנצפים לאורך זמן. מערכת זו מיועדת לשימוש על ידי מטופל בודד.

## מידע בטיחות בנוגע ל-MRI

ניתן לסרוק מטופל בעל התקן מסוג זה בסורק בתהודה מגנטית מאוזן, סגור העומד בתנאים הבאים:

- שדה מגנטי סטטי של 1.5 טסלה או 3.0 טסלה.
- גרדיאנט שדה מרבי של 1900 גאוס לס"מ ( $\geq 19 \text{ T/m}$ ).
- קצב ספיגה סגולי (SAR) ממוצע לכל הגוף, המרבי המדווח למערכת תהודה מגנטית, של 4 W/kg (רמת הפעלה מבוקרת ראשונה) למשך 15 דקות של סריקה מתמשכת או SAR של 2 W/kg למשך 30 דקות של סריקה מתמשכת.

בתנאי הסריקה המוגדרים לעיל, תוצאות בדיקות לא קליניות מראות כי עליית הטמפרטורה המרבית הצפויה להיווצר מחיישן Eversense E3 היא פחות מ- $5.4^{\circ}\text{C}$ .

בבדיקות לא קליניות, ממצא הדמה הנגרם מההתקן מתפרש על פני כ-72 מ"מ (2.83 אינצ') מחיישן Eversense E3 כאשר הוא נסרק בהדמיה בתדר פולס בשיטת gradient echo ובמערכת תהודה מגנטית של 3 טסלה.

חיישן Eversense E3 לא נבדק במערכות תהודה מגנטית שאינן עומדות בתנאים המפורטים לעיל. חשיפת חיישן Eversense E3 לתנאי הדמיה בתהודה מגנטית שאינם עומדים בתנאים המפורטים לעיל יכולה לגרום לסיבוכים אפשריים, כגון נידדת ההתקן, חימום ונזק לרקמות או כרסום (ארוזיה) דרך העור.

המשדר החכם Eversense E3 אינו בטוח לשימוש עם תהודה מגנטית ויש להסירו לפני ביצוע הליך של MRI. לפני ההתחלה של הליך MRI, אמור לצוות ה-MRI שאתה נושא חיישן ומשדר חכם Eversense E3, והתייעץ עם צוות הבריאות אשר החדיר את החיישן.

לגרסה המעודכנת ביותר של תווית מערכת ה-Eversense E3 CGM, היכנס לאתר <https://global.eversensedidiabetes.com>. אתה תקבל כרטיס שתל בינלאומי מצוות הבריאות שלך בכל החדרת חיישן. שמור על כרטיס זה בארנק שלך לעיון.

## התוויות נגד

אנשים להם יש התוויות נגד דקסמתזון או דקסמתזון אצטט לא ישתמשו במערכת. המשדר החכם אינו תואם להליכי הדמיה בתהודה מגנטית (MRI). על מטופלים להימנע מהליך MRI כאשר הם נושאים את המשדר החכם. למידע על החיישן, עיין במידע הבטיחות ל-MRI. מניטול או סורביטול, כאשר הם ניתנים באופן תוך ורידי, או כחלק מתמיסת עירוי או תמיסת דיאליזה צפקית, עלולים להעלות את ריכוזי המניטול או הסורביטול ולגרום לקריאות גבוהות שגויות של התוצאות המסופקות על ידי החיישן שלך. חלק מן הממתיקים המלאכותיים עושים שימוש בסורביטול, ורמות ריכוז מצריכה נורמלית כחלק מן התזונה לא תשפיענה על קריאות החיישן.

## מה כלול בחבילה זו

ערכת המשדר החכם של Eversense E3 כוללת את הבאים:



מקור מתח

(ערכת המשדר החכם שלך תכלול תקע לקיר המתאים לשימוש באזור המקומי שלך.)



עריסת טעינה



משדר חכם Eversense E3

אריזה זו כוללת גם את המדריך למשתמש ואת המדריך לעיון מהיר.

## איך להשתמש במדריך למשתמש זה

- מדריך זה מתאר איך להשתמש במערכת ה-CGM שלך. קרא את כל המדריך לפני השימוש במערכת.
- כל האזהרות או אמצעי הזהירות מודגשים בתיבה נפרדת.
  - טיפים למשתמש יופיעו לאחר הסימן ✓.

חלק זה מתאר את היתרונות, המקרים החריגים והסיכונים המשויכים לשימוש במערכת Eversense E3 CGM. חלק זה מתאר את ההטבות, הציפיות והסיכונים המשויכים לשימוש במערכת Eversense E3 CGM. מידע נוסף בנוגע לבטיחות זמין בכתובת <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> (מאגר המידע האירופי להתקנים רפואיים - EUDAMED) בתמצית לבטיחות וביצועים (SSCP) של מערכת Eversense E3 CGM, או על פי בקשה למחלקת שירות הלקוחות. ה-SSCP מקושרת אל מספרי ה-UDI-DI הבסיסיים של רכיבי מערכת Eversense E3 CGM אותם ניתן למצוא על גבי הכריכה האחורית של מדריך זה. ה-SSCP מקושרת אל מספרי ה-UDI-DI הבסיסיים של רכיבי מערכת Eversense E3 CGM אותם ניתן למצוא על גבי הכריכה האחורית של מדריך זה.

ניטור סוכר רציף עוזר לניהול מחלת הסוכרת ובקרת רמות הסוכר, דבר היכול לשפר את איכות החיים שלך. התוצאות הטובות ביותר יושגו כאשר יהיה בידך מידע מלא בנושא סיכונים ויתרונות, הליך ההחלטה, דרישות המעקב והאחריות המוטלת עליך לטיפול עצמי. אם אינך יכול להפעיל כראוי את מערכת CGM, יש להימנע מהחדרת החיישן לגופך.

מערכת CGM מודדת את רמת הסוכר בנוזל בין-תאי (ISF) שנמצא בין תאי הגוף. ההבדלים הפיזיולוגיים בין הנוזל הבין-תאי לבין הדם בדגימת דם עשויים לגרום להבדלים במדידות של רמת הסוכר בדם. הבדלים אלה ניכרים במיוחד כאשר מתבצעים שינויים מהירים ברמת הסוכר בדם (כגון לאחר אכילה, קבלת מנת אינסולין או פעילות גופנית), ואצל חלק מהאנשים, במהלך הימים הראשונים לאחר ההחלטה עקב זיהום העלול להיגרם כתוצאה מהליך ההחלטה. מספר דקות תחלופנה עד שרמת הסוכר בדם מגיעה לרמת הסוכר בנוזל הבין-תאי.

**חשוב:** אם התסמינים שלך אינם מתאימים להתרעות הסוכר ולקריאות של מערכת ה-Eversense E3 CGM, יש לבצע בדיקת סוכר בדם מהאצבע עם מד סוכר בדם ביתי לפני ביצוע של כל החלטת טיפול.

שימוש לא נאות במערכת Eversense E3 CGM בהתאם להוראות השימוש עלול להוביל לפספוס שלך של אירוע סוכר היפוגליקמי או היפרגליקמי, דבר העלול לגרום לפציעה.

לחיישן יש טבעת סיליקון שמכילה כמות קטנה של תרופה אנטי-דלקתית (דקסמתזון אצטט). לא נקבע אם הסיכונים המשויכים בדרך כלל לדקסמתזון אצטט שמוזרק חלים על טבעת ההשטפה של דקסמתזון אצטט שנמצאת בתוך החיישן. טבעת ההשטפה משחררת כמות קטנה של דקסמתזון אצטט כאשר החיישן בא במגע עם נוזלי הגוף במטרה למזער את התגובה הדלקתית של הגוף לחיישן המיוחד. חומר הדקסמתזון אצטט בטבעת יכול גם לגרום לתופעות לוואי אחרות אשר לא נראו בעבר בזריקות. על מנת לקבל רשימה של תופעות לוואי אפשריות לחומר דקסמתזון אצטט, צור קשר עם הרופא שלך.

שינויים לא מורשים של הציוד, גישה לא מתאימה אל המידע הנמצא בו או "פריצה" של המערכת שלך ונקיטה בפעולות אחרות שאינן מורשות עלולים לגרום לתפקוד לקוי של מערכת ה-CGM ועלולים להעמיד אותך בסכנה. שינויים לא מורשים של הציוד אינם מותרים ואתה תאבד את האחריות שלך אם תבצע אותם. יש לדווח ליצרן ולרשויות המדינה במדינה החברה שלכם על כל אירוע חמור שהתרחש וקשור לשימוש בהתקן.

## סיכונים ותופעות לוואי

התרעות והודעות רמות הסוכר לא תישמענה כאשר הצליל במכשיר הנייד שלך מכובה. אם למערכת אין אפשרות להציג ערך סוכר, היא לא תוכל לספק התרעות סוכר. אם אינך מסוגל להרגיש את הרטט של המשדר החכם, אתה עלול גם שלא לשים לב להתרעות. יכול להיות שתצטרך עזרה רפואית במקרים של רמות סוכר גבוהות או נמוכות כאשר אינך מודע לכך. רמות הסוכר המחושבות על ידי המערכת עלולות להיות שונות במקצת בהשוואה למד הסוכר שלך בדם. הדבר עלול לגרום להפעלת התרעה בזמן שונה מן הזמן שהיא הייתה מופעלת אם ערכי המערכת תמיד היו שווים לערכי מד הסוכר בדם.

**חשוב:** אם לא תבצע מדידות בעזרת מד סוכר בדם כאשר התסמינים שלך לא מתאימים לקריאות הסוכר של החיישן, אתה עלול להחמיץ אירוע של רמות סוכר גבוהות או נמוכות.

יש לבסס את החלטות הטיפול על ידי סקירה של הדברים הבאים: ערך סוכר הבא מן החיישן, חץ מגמה, גרף מגמת סוכר עדכני והתרעות/הודעות מן המערכת. אל תיקח החלטות טיפול אלא אם לקחת בחשבון את כל המידע הנ"ל. וודא שאתה מדבר עם הצוות הרפואי שלך אודות פעולת אינסולין כך שתוכל להבין איך ההשפעה שלו על הסוכר שלך יכולה להיות גורם בהחלטות הטיפול שלך.

החיישן מוחדר על ידי ביצוע של חתך קטן ומיקום החיישן מתחת לעור. ההשתלה עלולה לגרום לזיהום, גירוי בעור, כאב, שטף דם, שינוי צבע או דלדול של העור. במהלך המחקרים דווח על מספר קטן של מקרי סחרחורות, התעלפויות ובחילות, כמו גם על מקרים בהם החיישן נשבר או שלא ניתן היה להוציאו בניסיון הראשון. בנוסף, המדבקה עלולה לגרום לתגובה או לגירוי בעור. יש לדווח לצוות הרפואי שלך על כל בעיה רפואית הקשורה להליך או לשימוש בהתקן. יהיה צורך בהליך הסרה נוסף בסיום חיי החיישן.

- מערכת Eversense E3 CGM לא נבחנה על ידי שימוש במיקומי החדרה שונים מלבד החלק העליון של הזרוע.
- אם בכל זמן התסמינים שלך לא מתאימים לקריאות הסוכר של החיישן, עליך למדוד את רמת הסוכר שלך בדם.
- לפני כל החלטת טיפול, עליך לקחת בחשבון את ערך הסוכר המגיע מן החיישן, את גרף המגמה, את חץ המגמה וכל התרעה המגיעה ממערכת ה-Eversense E3 CGM. אם חץ המגמה אינו מוצג, למערכת אין מספיק נתונים על מנת להציג את כיוון ושיעור השינוי. אל תיקח החלטות טיפול המתבססות רק על ערך הסוכר בחיישן.
- אם נגרם נזק למשדר החכם או שהוא נסדק, אל תשתמש בו, מאחר שהדבר עלול ליצור סכנת בטיחות חשמלית או לתקלה במכשיר שעלולים לגרום להתחשמלות.
- קרבה רבה להפרעה אלקטרומגנטית (EMI) ישירה עלולה לשבש את יכולתו של המשדר החכם לשלוח נתונים למכשיר הנייד. התרחק ממקור ה-EMI ובדוק שהמכשיר הנייד שלך מחובר אל המשדר החכם שלך.
- תרופות אנטיביוטיות מסוג טטרציקלין עלולות להוריד באופן שגוי את קריאות הסוכר של החיישן. אל תתבסס על קריאות הסוכר בחיישן כאשר אתה נוטל טטרציקלין.
- על התחבושת להישאר ולכסות את החתך למשך 48 שעות בגלל שזהו הטיפול הסטנדרטי על מנת לאפשר יצירה של אטם עמיד במים בכדי לסייע בהגנה מפני דלקות. עד להחלמה, כסה תמיד את מיקום ההחדרה בתחבושת סטרילית לפני הנחת הדבק של המשדר החכם על החיישן. אם לא תעשה זאת, עלולה להתפתח דלקת באתר ההחדרה.
- עיין במדריך למשתמש זה יחד עם הצוות הרפואי שלך. למידע נוסף ואיתור וטיפול בבעיות הנוגעות למוצר Eversense E3, צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בטלפון 844-SENSE4U (844-736-7348). אם אתה נמצא מחוץ לארה"ב, צור קשר עם המפיץ המקומי או בקר באתר <https://global.eversensedidiabetes.com> על מנת לראות מיהו המפיץ המקומי באזורך.
- כיוול תמיד את המערכת באמצעות דגימות דם מהאצבע. אין להשתמש בקריאת סוכר בדם מאתר חלופי (לדוגמה, האמה או כרית כף היד) לכיוול המערכת.

## אזהרות (המשך)

- אין להחדיר את ערכת העירוי או להזריק אינסולין בטווח של 10.16 ס"מ (4 אינצ') מאתר החיישן. אם אתר הזרקת האינסולין נמצא בטווח של 10.16 ס"מ (4 אינצ') מאתר החיישן, הוא עלול לשבש את קריאות הסוכר מהחיישן ולגרום לקריאות סוכר לא מדויקות.
- פעל תמיד בהתאם להוראות הטיפול של הרופא לאחר החדרה או הסרה של החיישן. פנה לרופא שלך במקרה שאחד האירועים הבאים יתרחש:
  - אם יש לך כאבים, אדמומיות או נפיחות במקום החתך יותר מ-5 ימים לאחר ההחדרה או ההוצאה של החיישן, או אם החתך לא החלים תוך 5 עד 7 ימים.
- אם קריאת סוכר בחיישן היא מאוד נמוכה (מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל) או מאוד גבוהה (מעל ל-400 מ"ג/ד"ל), עליך לבצע בדיקת סוכר בדם מהאצבע לפני ביצוע של כל החלטת טיפול.
- מערכת ה-Eversense E3 CGM דורשת כיול על מנת לספק קריאות מדויקות. אל תשתמש בקריאות CGM על מנת לבצע החלטות טיפול אלא אם כן עקבת אחר ההוראות לכיול יומי.
- מערכת ה-Eversense E3 CGM לא תספק קריאות במהלך תקופת החימום בת 24 השעות ועד לאחר כיול שני מוצלח במהלך שלב האתחול. במהלך תקופה זו, עליך לנטר את הסוכר שלך על ידי שימוש במד סוכר בדם.
- התרעות ותנאים מסוימים ימנעו את תצוגת נתוני הסוכר. במהלך תקופות אלו, עליך להשתמש במד סוכר ביתי בדם על מנת לבצע החלטות טיפול. עליך לקרוא בזירות את חלק ההתרעות וההודעות בתוך מדריך למשתמש במערכת Eversense E3 CGM על מנת להבין תנאים אלו.
- התרעות והודעות רמות הסוכר לא תישמענה כאשר הצליל במכשיר הנייד שלך מכובה. אם למערכת אין אפשרות להציג ערך סוכר, היא לא תוכל לספק התרעות סוכר. אם אינך מסוגל להרגיש את הרטט של המשדר החכם, אתה עלול גם שלא לשים לב להתרעות.
- כאשר המשדר החכם לא נישא מעל לחיישן, כגון בזמן טעינה, מערכת ה-Eversense E3 CGM לא תספק התרעות והודעות אל המכשיר הנייד או באמצעות התרעות רטט מן המשדר החכם.
- אם אתה אלרגי לאחד מן החומרים בהם נעשה שימוש בחיישן או במשדר החכם ואשר רשומים בנתונים הטכניים של מדריך זה למשתמש, אל תשתמש במערכת ה-Eversense CGM.

## אמצעי זהירות

- אין להחליף משדרים חכמים עם אדם אחר. כל משדר חכם יכול להתחבר לחיישן אחד בכל פעם. במערכת זו ישתמש אדם יחיד בסביבה ביתית.
- הפרוצדורות או הטיפולים הרפואיים הבאים עלולים לגרום נזק לצמיתות לחיישן, במיוחד כאשר נעשה בהם שימוש בסמיכות למכשיר:
  - שימוש באולטרה-סאונד לשם ריסוק אבנים – השימוש באולטרה-סאונד לשם ריסוק אבנים איננו מומלץ לאנשים להם מוחדר החיישן בגלל שההשפעות אינן ידועות.
  - דיאתרמיה – אין להשתמש בדיאתרמיה על אנשים להם מוחדר החיישן. אנרגיה מן הדיאתרמיה יכולה לעבור דרך החיישן ולגרום לנזק לרקמות במיקום ההחדרה.
  - צריבה חשמלית – השימוש בצריבה חשמלית ליד החיישן המוחדר עלול לגרום נזק למכשיר. נא לא להשתמש בצריבה חשמלית ליד החיישן.
- שימוש בסטרוואידים – לא נקבע האם הסיכון הכרוך בדרך כלל עם הזרקת דקסמתזון אצטט נכון גם לגבי השימוש בדקסמתזון אצטט בטבעת הנמצאת בחיישן, התקן לשחרור מבוקר עם רמת התאמה גבוהה. טבעת חומר הדקסמתזון אצטט עלולה לגרות לתופעות לוואי לא רשומות או אשר לא נראו בעבר.
- אין ללבוש את המשדר החכם במהלך סריקות רנטגן או טומוגרפיה ממוחשבת (CT). כדי למנוע שיבוש של התוצאות, יש להסיר את המשדר החכם לפני ביצוע סריקות רנטגן או CT רפואיות. יש לוודא שהצוות הרפואי מודע למשדר החכם.
- יש לקשר את החיישן אל המשדר החכם ביום החדרת החיישן. אי קישור החיישן למשדר החכם עלול לגרום לעיכוב בקבלת קריאות הסוכר.
- אם החיישן או המשדר החכם מרגישים חמים, הסר מיד את המשדר החכם וצור קשר עם הצוות הרפואי שלך להמשך טיפול. חיישן חם עלול להצביע על זיהום או תפקוד לקוי של החיישן.
- אל תנסה להשתמש באפליקציית Eversense בעת תפעול רכב ממונע.
- אין לקבל טיפול בעיסוי בסמיכות לאתר החדרת החיישן. טיפול בעיסוי בסמיכות לאתר החיישן עלול לגרום לאי נוחות או לגירוי בעור.

## אמצעי זהירות (המשך)

- השתמש בשנאי מתח AC ובכבל ה-USB שסופקו עם המשדר החכם בלבד לצורך טעינת סוללת המשדר החכם. שימוש במקור מתח אחר עלול לגרום למשדר החכם נזק שימנע קבלה תקינה של קריאות הסוכר, ליצור סכנת אש ואף עלול לגרום לביטול האחריות שלך. אם שנאי מתח ה-AC וכבל ה-USB שלך של Eversense פגומים או שהם אבדו, צור קשר עם תמיכת הלקוחות להחלפה על מנת להבטיח הפעלה בטוחה של המכשיר.
- אם יש לך חששות לגבי תגובות אלרגיות למוצרים דביקים המכילים סיליקון, צור קשר עם הצוות הרפואי שלך לפני השימוש. זרוק את המדבקה הדביקה לאחר כל שימוש של עד 24 שעות.
- אל תשנה את יחידת המידה אלא אם כן שוחחת על כך עם הצוות הרפואי שלך. השימוש ביחידת מידה לא נכונה עלול לגרום לפספוס של אירוע סוכר גבוה או נמוך.
- הזנה של ערכי סוכר לא נכונים במהלך הכיול עלולה לגרום לקריאות סוכר בחיישן לא נכונות, דבר העלול לגרום לך לפספס אירוע סוכר גבוה או נמוך.
- עקוב אחר המלצות הצוות הרפואי שלך בעת הגדרת התרעות הסוכר שלך. הגדרות לא נכונות של התרעות סוכר עלולות לגרום לך לפספס אירוע סוכר גבוה או נמוך.
- עליך לשים לב אל התרעות הסוכר אותן המערכת מספקת. תגובה לא נכונה אל התרעות סוכר עלולה לגרום לך לפספס אירוע סוכר גבוה או נמוך.
- אפליקציית ה-Eversense NOW לניטור מרחוק איננה מחליפה את משטר הניטור שניתן לך על ידי הצוות הרפואי שלך.
- מערכת Eversense E3 CGM לא נוסתה באוכלוסיות הבאות: נשים בהריון או נשים מניקות, אנשים שגילם מתחת ל-18, אנשים חולים או מאושפזים בבית חולים, אנשים המקבלים חומרים המדכאים את המערכת החיסונית שלהם, אנשים המקבלים כימותרפיה או טיפולים נגד קרישת הדם, אנשים בעלי התקנים מושתלים פעילים אחרים, לדוגמה, דפיברילטור מושתל (שתלים שאינם פעילים מותרים, לדוגמה, תומכי לב), אנשים בעלי אלרגיות ידועות לגלוקוקורטיקואידים מערכתיים או המשתמשים בהם (לא כולל טופיקליים, אופטיים או אפיים, אך כולל נשאפים). דיוק המערכת לא נבחן באוכלוסיות אלו וקריאות הסוכר בחיישן יכולות להיות לא מדויקות, כאשר התוצאה היא פספוס של אירוע סוכר נמוך או גבוה.
- שעון ה-Apple הוא תצוגה משנית של נתוני ה-Eversense E3 CGM ואין להשתמש בו כתחליף לתצוגה הראשונית של ה-Eversense E3 CGM.

# 3. תחילת השימוש

3

חלק זה מתאר את שלבי ההפעלה הראשונית לפני תחילת השימוש במערכת Eversense E3 CGM החדשה על בסיס יומי. תוכל לבצע שלבים אלה לפני שהצוות הרפואי שלך יחדיר את החיישן.

על מנת להתחיל אתה צריך:

- המכשיר הנייד שלך להורדת אפליקציית Eversense .
- חיבור אלחוטי לאינטרנט.
- חבילת המשדר החכם של Eversense E3 הכוללת את המשדר החכם שלך ומקור מתח.

**הערה:** אם עדיין לא קיבלת את חבילת המשדר החכם שלך דלג להוראות ההורדה וההתקנה של אפליקציית Eversense-אל המכשיר הנייד שלך, בהמשך חלק זה.

תוכל לבצע את שלבי ההפעלה הראשונית לפני שהחיישן יוחדר, כך שתלמד להכיר את המערכת.

## שני צעדי התחלה קלים:

1. הורד את אפליקציית Eversense אל המכשיר הנייד שלך.
2. הגדר את האפליקציה – צור חשבון, קישור והגדרות.

לאחר שתקבל את המשדר החכם שלך עליך להטעין אותו במלואו לפני שיהיה ניתן לחברו לאפליקציה.

**הערה:** המשדר החכם שלך מוגדר למצב "שינה" בעת המשלוח. כאשר תטעין את המשדר החכם שלך בפעם הראשונה, המצב ישתנה למצב פעיל.

המשדר החכם שלך מגיע עם אחריות ל-12 חודשים. המערכת תשלח לך התרעה כאשר אחריות המשדר תעבור את גבול ה-365 ימים.

## הטען את המשדר החכם שלך


חשוב להטעין את סוללת המשדר החכם שלך בכל יום על מנת להבטיח את איסוף הנתונים מן החיישן ושליחתם אל האפליקציה. המשדר החכם אינו אוסף נתונים מן החיישן או שולח נתונים אל האפליקציה בעת הטעינה. תוכל גם להטעין את המשדר החכם בחיבור כבל ה-USB לציאת ה-USB של המחשב במקום מתאם מתח AC. טעינה מלאה של סוללת המשדר החכם באמצעות מחשב עלולה להימשך זמן רב יותר.

**זהירות:** השתמש בשנאי מתח AC ובכבל ה-USB שסופקו עם המשדר החכם בלבד לצורך טעינת סוללת המשדר החכם. שימוש במקור מתח אחר עלול לגרום למשדר החכם נזק שימנע קבלה תקינה של קריאות הסוכר, ליצור סכנת אש ואף עלול לגרום לביטול האחריות שלך. אם שנאי מתח ה-AC וכבל ה-USB שלך של Eversense פגומים או שהם אבדו, צור קשר עם תמיכת הלקוחות להחלפה על מנת להבטיח הפעלה בטוחה של המכשיר.

**2.** חבר את קצה המיקרו של כבל ה-USB אל עריסת הטעינה על גבי יציאת ה-USB.




**1.** חבר את הקצה הסטנדרטי של כבל ה-USB אל המתאם של יציאת ה-USB.

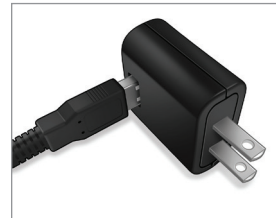

#### 4. חבר את המתאם לשקע מתח AC.

- לאחר טעינה מלאה, נורת לד קטנה ירוקה תופיע בחלק העליון הקדמי של המשדר החכם (מעל לחצן ההפעלה).
- נתק את מקור המתח מן המשדר החכם לאחר טעינה מלאה.
- על מנת לשחרר את המשדר החכם מעריסת הטעינה, משוך לאחור את הלשונית והרם את המשדר החכם מעריסת הטעינה.

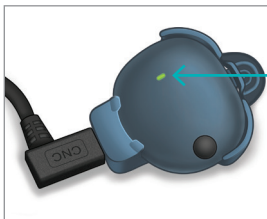

נורת חייווי  
(נדלקת בירוק  
או כתום)

#### 3. התאם את ארבעת הפינים המוזהבים בחלק התחתון של המשדר החכם לארבעת הפינים המוזהבים בעריסת הטעינה.

- החלק את המשדר החכם אל מקומו בעריסת הטעינה.
- לאחר שמיקמת אותו, לחץ על המשדר החכם כלפי מטה, עד שייכנס למקומו.




האפליקציה מיועדת לפעול עם המשדר החכם כדי לקבל ולהציג באופן אוטומטי את נתוני הסוכר מהחיישן.

**1. בחר את המכשיר הנייד בו תרצה להשתמש על מנת להציג את קריאות הסוכר שלך. ברוב המקרים, זה יהיה טלפון חכם.**



**2. הורד את אפליקציית Eversense החינמית מ- Apple App Store או מ-Google Play.**  
ההנחיות להתקנת האפליקציה במערכות ההפעלה של iOS שונות מאלה של מערכות ההפעלה אנדרואיד.

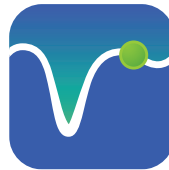

סמל אפליקציית Eversense

**הערה:** וודא שהמכשיר הנייד שלך עושה שימוש במערכת ההפעלה התואמת Eversense העדכנית ביותר.

**3. במסך ההתקנה, לחץ על Install application (התקן אפליקציה) ופעל בהתאם להוראות ההתקנה.**  
לאחר 1-2 דקות, בדוק אם הסמל של אפליקציית Eversense מופיע בתצוגת המכשיר הנייד (כמוצג בצד שמאל).

"Eversense CGM" Would Like to Send You Notifications

Notifications may include alerts, sounds and icon badges. These can be configured in Settings.

Don't Allow

Allow

**הערה:** וודא שאתה מאפשר קבלת הודעות מאפליקציית Eversense בכדי לקבל התרעות והודעות אל המכשיר הנייד שלך.

**חשוב:** וודא שיש לך חיבור אלחוטי לאינטרנט, שהתאריך והשעה המופיעים על גבי המכשיר הנייד שלך נכונים ושה-Bluetooth מופעל לפני שתמשיך.

## שלב 2. הגדרת האפליקציה - יצירת חשבון, קישור והגדרות

3

לאחר הורדת האפליקציה, חבר בין האפליקציה למשדר החכם על ידי קישור המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלך.

### 2. לאחר שתסכים להסכם אתה תתבקש ליצור ולרשום חשבון עם כתובת דוא"ל וססמה.

- עליך ליצור חשבון לפני שתוכל להיכנס למערכת. לחץ על **Create an Account** (צור חשבון).

**הערה:** אם כבר יש לך חשבון ושכחת את הססמה שלך, תוכל לאפס אותה דרך האפליקציה. אם שכחת את כתובת הדוא"ל המקושרת אל החשבון, עבור אל **Main Menu > About > My Account** (תפריט ראשי > אודות > החשבון שלי).

### 1. הקש על הסמל של אפליקציית Eversense במכשיר הנייד כדי להפעיל את האפליקציה.

הגרסה המלאה של הסכם הרישיון עבור משתמש הקצה מוצגת.

- קרא ולחץ על **Accept** (קבל).

Having read the Privacy Policy, clicking on the "Accept" button I provide my consent for the processing of my health-related data in order to be used by Senseonics to provide and operate the Senseonics Products and Services.

Cancel

Accept

3. הזן את המידע הקשור לחשבון שלך ולחץ על **Submit** (הגש).

- לחץ על **Done** (סיום) בכדי לחזור אל מסך הכניסה למערכת Eversense.

Done ouspilot.eversensedms.com

eversense

English (UK)

Create New Account

First Name \*

Last Name \*

Email \*

Create a password \*


Confirm your password \*

Next


Have account already? Please go to Sign In

Copyright © 2022 Simsonics® All rights reserved.

4. הזן את כתובת הדוא"ל ואת הססמה שלך ולחץ על **LOG IN** (היכנס). אתה תראה מסך אישור. לחץ על **OK** (אישור).  
**הערה:** הססמה תלוית רישיות (הבדלים בין אות קטנה לגדולה).

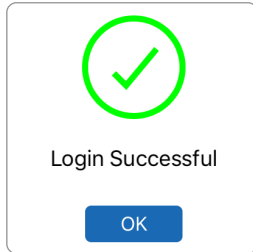


## משתמשי אנדרואיד נדרשים לאשר שירותי מיקום.

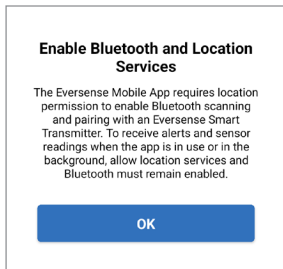


- הקש **OK** לאישור שירותי מיקום. נדרשת הרשאה לחיבור Bluetooth.

- לאחר מכן הקש **Allow** (הרשאה) כדי להבטיח קבלת התראות כאשר האפליקציה נמצאת בשימוש או פועלת ברקע.

**הערה:** משתמשי אנדרואיד OS 12 ומעלה יכולים לראות חלון קופץ שונה עבור בקשת ההרשאה.

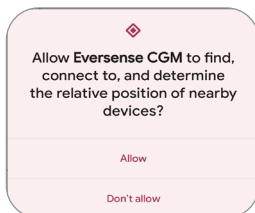

## 5. לאחר השלמת הרישום והכניסה אל המערכת, יופיע מסך WELCOME (ברוכים הבאים).

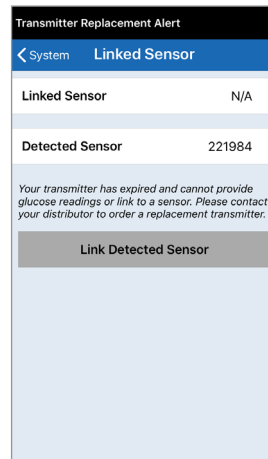

## 6. בחר באחת משתי האפשרויות הרלוונטיות לך (תלוי אם יש לך או אין לך משדר חכם):

I have a Smart Transmitter

IX

I do not have a Smart Transmitter

(עבור לצעד 12).

**7. כאשר המשדר החכם מופעל, וכאשר מסך PAIR YOUR TRANSMITTER (קישור המשדר) מופיע במכשיר הנייד, הגדר את המשדר החכם למצב "ניתן לגילוי" כדי שהמכשיר הנייד יאתר את המשדר החכם:**


- לחץ על לחצן ההפעלה של המשדר החכם שלוש פעמים. וודא שהמשדר החכם שלך אינו מחובר למקור מתח.
- נורית החיווי תהבהב בצבעים ירוק וכתום על מנת להראות שהמשדר החכם נמצא במצב 'ניתן לגילוי'.



**הערה:** אם אתה לוחץ על לחצן ההפעלה של המשדר החכם ונורית החיווי איינה נדלקת, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ-5 שניות על מנת להפעיל אותו.

**8. במסך PAIR YOUR TRANSMITTER (קישור המשדר), מזהה המשדר החכם שזוהה על-ידי האפליקציה מוצג כ' Not Connected ' (לא מחובר). (מספר הזיהוי של המשדר החכם שלך תואם למספר הסידורי הנמצא על החלק האחורי של המשדר החכם שלך).**


• הקש **Not Connected** (לא מחובר) על מנת להתחיל תהליך חיבור.

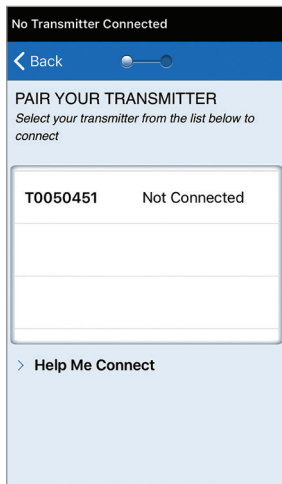

**9. החלון המוקפץ BLUETOOTH PAIRING REQUEST (בקשה לקישור Bluetooth) מופיע.**


- הקש **Pair** (קישור) על מנת להשלים את תהליך החיבור.

**הערה:** ניתן לחבר את המשדר החכם למכשיר נייד אחד בכל פעם.

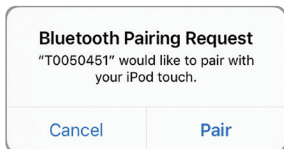


11. UNIT OF MEASUREMENT מסך (יחידת מידה) יופיע ויצוין את יחידת המידה הסטנדרטית עבור האזור שלך. קריאות הסוכר שלך תוצגנה תמיד ביחידת מידה זו.

- לאחר אישור יחידת המידה, לחץ על **Finish** (סיים).

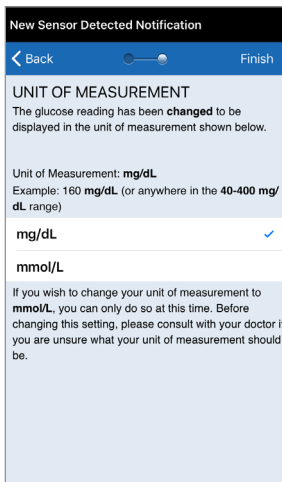

זהירות: אל תשנה את יחידת המידה אלא אם כן שוחחת על כך עם הצוות הרפואי שלך.

10. המילה "Connected" תופיע ליד מספר הזיהוי של המשדר החכם לאחר שהחיבור הסתיים. המשדר החכם ירטוט לסירוגין עד אשר המשדר החכם יקושר לחיישן המיוחד (ראה החדרה וקישור של החיישן). לחץ על **Next** (הבא).

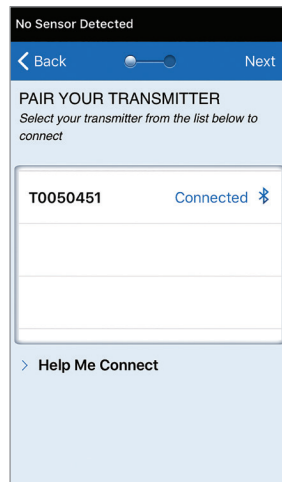

# 12. לחץ דרך מסכי המבוא המספקים מידע אודות הזמן בו יש לקחת החלטות טיפוליות עם מערכת Eversense E3 CGM.

No Transmitter Connected

← Back      Next

**Symptoms don't match the app?**  
If your symptoms do not match what you see on the Eversense CGM Mobile App, use your BG meter to confirm with a fingerstick check before making a treatment decision.

If you are unsure, do a fingerstick check with your BG meter.

No Transmitter Connected

← Back      Next

**Treatment decisions OK**  
Make a treatment decision when ALL of the information below is available.

Status bar

Glucose value

Trend arrow

Recent trend information and alerts

No Transmitter Connected

← Back      Next

Continuous Glucose Monitoring System

**Welcome to the Eversense CGM Mobile App.**

This short introduction will help you understand when to use the CGM system to make treatment decisions.

You should use your meter to make treatment decisions until you understand how the duration of insulin action impacts your glucose in different situations.

Refer to your Eversense CGM System User Guide for complete information on making treatment decisions using your CGM System.

No Transmitter Connected

← Back      Done

**Summary**  
Should you make a treatment decision?

✓ Yes.

✗ No. Symptoms don't match the app.

✗ No.

✗ No.

No Transmitter Connected


← Back      Next

**Treatment decision not OK**  
You should not make a treatment decision when:

No glucose value is displayed - no reading is available.

Glucose Value is displayed in grey - not enough data to display trend arrow.

### 13. לאחר מכן, מסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי) יופיע. במסך זה לא יוצגו נתוני סוכר בשלב זה.

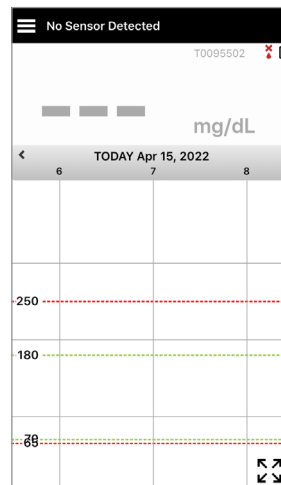

לאחר שהחיישן יוחדר על ידי הצוות הרפואי שלך ולאחר השלמת תקופת חימום של 24 שעות, אתה תוכל להתחיל את הכיול. אם החיישן שלך עדיין לא הוחדר, אתה יכול לקרוא מדריך למשתמש זה על מנת להכיר טוב יותר את האפליקציה ואת המאפיינים שלה.

<p>כאשר הסמל הוא טיפת דם אפורה עם X, לא אותר כל משדר חכם. אתה תראה סמל זה לפני שתחבר את המשדר החכם שלך אל האפליקציה שלך ובכל זמן בו חיבור ה-BLE בין המשדר החכם אל האפליקציה שלך מנותק.</p>	
<p>כאשר הסמל הוא טיפת דם אדומה עם X, לא אותר כל חיישן. אתה תראה סמל זה לפני שתחבר את החיישן אל המשדר שלך ובכל זמן בו המשדר לא מאתר את החיישן.</p>	
<p>כאשר הסמל הוא טיפת דם אפורה או שחורה עם קווים מעליה, חיבור ה-NFC בין החיישן והמשדר החכם נקבע.          הקווים מציינים את חוזק האות. מידע אודות חוזק האות מוצג גם במסך <b>Main Menu &gt; Placement Guide</b> (תפריט ראשי &lt;מדריך מיקום) באפליקציית Eversense.          תזכורת: אינך יכול לחבר חיישן עד אשר המשדר שלך מחובר אל אפליקציית Eversense.</p>	   

# 4. קישור החיישן


4

חלק זה מתאר את הדרך בה יש לקשר את החיישן ואת המשדר החכם בפעם הראשונה לאחר החדרת החיישן על ידי הצוות הרפואי שלך. רק הצוות הרפואי שלך יכול להחדיר את החיישן. ראה חלק "אודות החיישן" למידע נוסף.

לאחר שהצוות הרפואי שלך החדיר את החיישן, יש לקשר בין המשדר החכם לחיישן כדי להתחיל את שלב החימום בן 24 שעות. ניתן לקשר את המשדר החכם לחיישן אחד בלבד בכל פעם. אין צורך לשאת את המשדר החכם במהלך שלב החימום.

**חשוב:** אנא קרא חלק זה במלואו לפני חיבור החיישן שלך.

אתה יכול לחבר את החיישן אל המשדר החכם בכל זמן לאחר החדרת החיישן ולאחר שהמשדר החכם חובר אל אפליקציית Eversense. על מנת לקשר את החיישן, על המכשיר הנייד שלך להיות מחובר אל האינטרנט ועל המשדר החכם להיות מוטען, מופעל ומקושר אל המכשיר הנייד שלך.

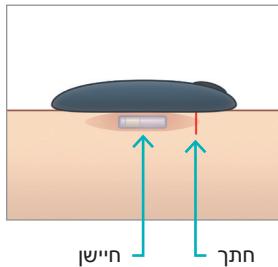


מיקום ההחדרה סגור באמצעות Steri Strips ומדבקה דביקה, כגון Tegaderm מונחת מעליו. חשוב להבין את הצורה בה צריך למקם את המשדר החכם מעל לחיישן על מנת להבטיח את השלמת הקישור. יש להעמיד את המשדר החכם במרכז מעל החיישן כפי שניתן לראות.


**חשוב:** הצוות הרפואי שלך ימלא כרטיס שתל בעת ההחדרה. אנא שמור על כרטיס זה בארנק שלך והחלף אותו כאשר אתה מקבל כרטיס חדש בעת כל החדרה חדשה.

# 1. וודא שמסדר החכם שלך מופעל (ראה השימוש במסדר החכם) ושלמכשיר הנייד שלך יש גישה אל האינטרנט.


- מקם את המסדר החכם ישירות על גבי החיישן המוחדר עד ש-**Placement Guide** (מדריך מיקום) באפליקציה מראה על מקום מסוים ושומר על מיקום זה ללא הפעלת לחץ. עמוד מדריך המיקום ממוקם ב-**Menu > Placement Guide** (תפריט < מדריך מיקום).

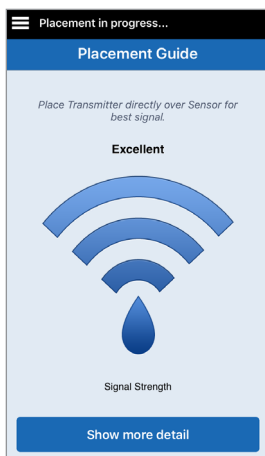



כאשר אתה מקשר את החיישן בפעם הראשונה, עם תחבושת ה-Tegaderm™ מעל מיקום ההחדרה כנראה שהחתך נמצא במרכז ה-Tegaderm. פירושו של דבר הוא שכנראה החיישן נמצא מעל מרכז ה-Tegaderm.

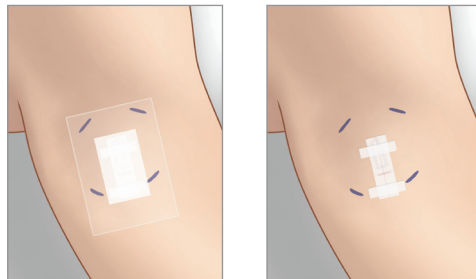

בפעם הראשונה בה אתה מקשר את החיישן, אל תשתמש במדבקת ה-Eversense הדביקה שלך על גבי המסדר החכם. בעת העמדת המסדר החכם מעל החיישן, הוא צריך להיות טיפה מעל מרכז מדבקת ה-Tegaderm.

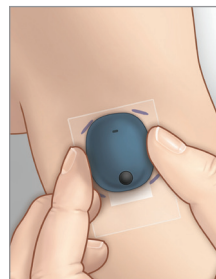



**3. כדי לקשר בין המשדר החכם לחיישן, לחץ על Link Sensor (קשר חיישן) במסך המוקפץ New Sensor Detected (אותר חיישן חדש), או לחץ על Menu > Settings > System > Linked Sensor (תפריט < הגדרות < מערכת < חיישן מקושר) ולאחר מכן לחץ על Link Detected Sensor (קשר את החיישן שזוהה).**

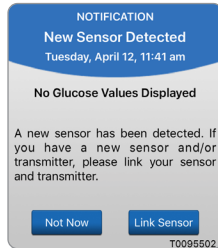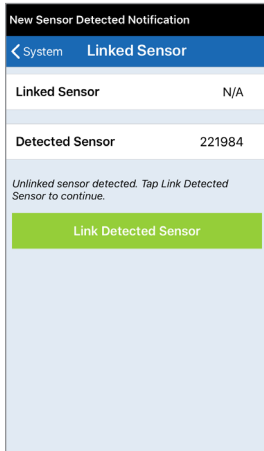



**הערה:** הזמן שייקח להודעה New Sensor Detected (זוהה חיישן חדש) להופיע עשוי להיות עד 5 דקות.

**2. לאחר שתאשר שיש אות, צא מדף Placement Guide (מדריך מיקום) למסך התפריט הראשי.**


**הערה:** החיבור בין החיישן והמשדר החכם רגיש לכיוון המשדר. אם המשדר החכם מונח ישירות על החיישן ומדריך המיקום מציין שאין חיבור, נסה לסובב מעט את המשדר החכם שמאלה או ימינה כך שהמשדר יימצא במרכז מעל לחיישן באופן אנכי.

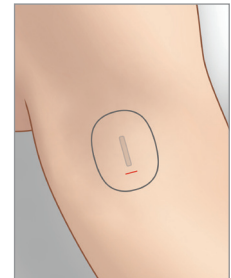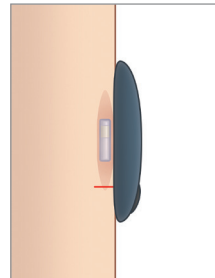


#### 4. תהליך הקישור יתחיל. בסיום של כל שלב יוצג סימן ביקורת. התהליך עשוי להימשך עד 10 דקות עד להשלמתו. אל תזיז את המשדר החכם ממיקום החיישן שלך עד אשר סימן האישור השלישי יוצג.

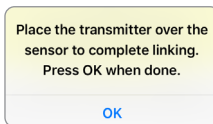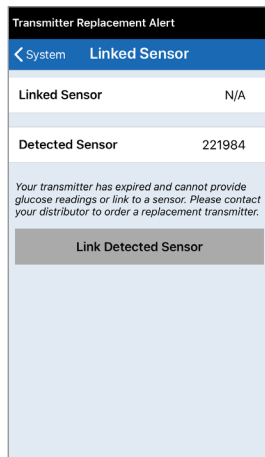

אם המשדר החכם מוזז ממיקום החיישן, המערכת תציג הודעה על כך.

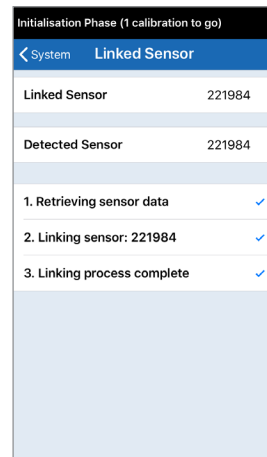

אם פג תוקפו של המשדר החכם שלך, לא ניתן יהיה לקשר אותו אל החיישן.

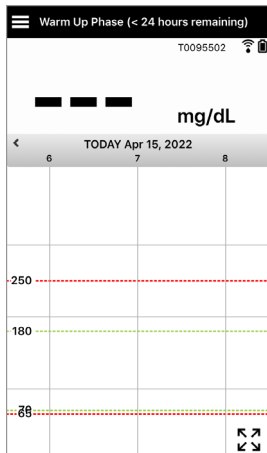


לאחר קישור החיישן, אתה יכול להסיר את המשדר החכם ולהניח אותו בעריסת הטעינה למשך 24 השעות הבאות. עיין בחלק *Using the Smart Transmitter* ( השימוש במשדר החכם), בכדי ללמוד על השימוש במערכת שלך לאחר שלב החימום.

**זהירות:** יש לקשר בין המשדר החכם והחיישן ביום בו הוחדר החיישן. אי קישור החיישן למשדר החכם עלול לגרום לעיכוב בקבלת קריאות הסוכר.

**הערה:** החיישן מצריך תקופת חימום של 24 שעות על מנת להתייבב בתוך הגוף שלך לפני איסוף קריאות הסוכר על ידי המשדר החכם. בעת תקופת החימום, אתה לא צריך לשאת את המשדר החכם שלך. אם תחליט לשאת את המשדר החכם מעל מיקום החיישן בתקופה זו, אתה תקבל מסר באפליקציה המראה שתקופת החימום נמצאת בעיצומה. לאחר השלמת תקופת החימום, הפעל את המשדר החכם והנח אותו מעל לחיישן בעזרת מדבקת ה-Eversense. המערכת תבקש ממך כיול על ידי שימוש באפליקציה.

**אזהרה:** מערכת ה-Eversense E3 CGM לא תספק קריאות במהלך שלב החימום בעל 24 שעות ועד לאחר כיול שני מוצלח במהלך שלב האתחול. במהלך תקופה זו, עליך לנטר את הסוכר שלך על ידי שימוש במד סוכר בדם.



**חשוב:** לאחר שלב חימום בעל 24 שעות, אם המשדר החכם שלך איננו מופעל ולא נישא מעל החיישן, המערכת לא תוכל לספק קריאות סוכר לאחר שלב החימום.

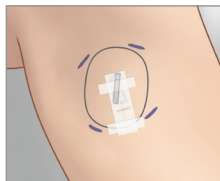

✓ **עצה:** יכול להיות שהחיישן שלך לא יהיה בדיוק ניצב אל החתך. אם אתה מוצא שקשה לך לקבל אות טוב או מצוין במדריך המיקום, אין להפעיל לחץ. נסה לסובב טיפה את המשדר החכם מעל לחיישן. המתן כשנייה עד לרענון מדריך המיקום בין כל התאמה של עמדת המשדר החכם מעל לחיישן.

## מדריך מיקום – מסך מרכזי


למטה ניתן למצוא את רמות חוזק האותן ניתן להציג.  
**עצה:** אין צורך בחוזק חיבור מצוין על מנת לקשר את החיישן או להשתמש במערכת שלך.

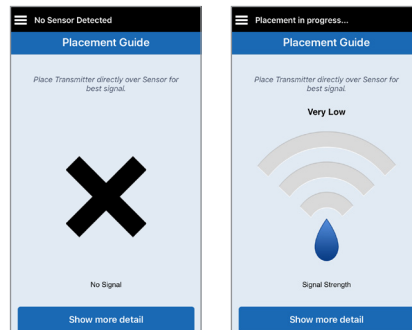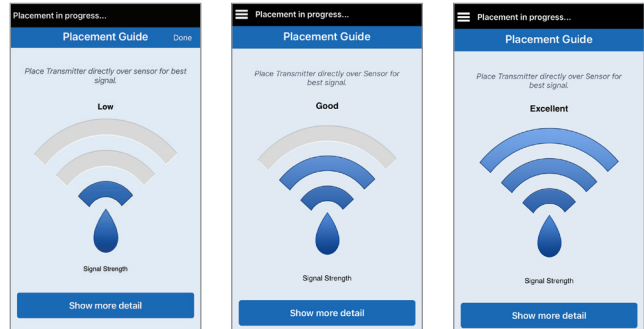

## מדריך מיקום – מסך פרטים נוספים

לחיצה על **Show More Detail** (הצג פרטים נוספים) מציגה מחוון חוזק אות ברזולוציה גבוהה יותר.

- הדבר יכול לעזור לך להעמיד באופן נכון את המשדר מעל החיישן.

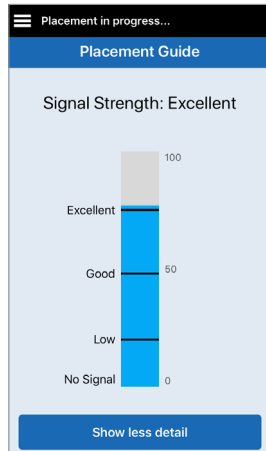

# 5. נשיאת משדר יומית

חלק זה מתאר את המאפיינים הרבים של המשדר החכם ואיך לבצע ניטור מתמשך ורציף של רמות הסוכר שלך.

5

לאחר השלמת שלב החימום מתחיל שלב האתחול ואתה מוכן להתחיל לשאת את המשדר החכם. בימים הראשונים, אתה תישא את המשדר החכם מעל תחבושת ה-Tegaderm™. תמיד יש להתחיל עם משדר חכם אשר נטען לאחרונה. המשדר החכם שלך מתקשר גם עם החיישן וגם עם האפליקציה על מנת לספק מידע של ניטור סוכר רציף (CGM).

המשדר החכם Eversense E3 שלך מבצע את הבאות:

- מפעיל את החיישן.
- מחשב ומאחסן נתוני סוכר.
- מספק התרעות ברטט על הגוף במקרה שתגיע לרמות ההתרעות על סוכר שהגדרת.
- שולח נתוני סוכר אל האפליקציה דרך Bluetooth.
- ניתן לטעינה מחדש על ידי שימוש בעריסת טעינה.
- עושה שימוש ביציאת USB על גבי עריסת טעינה בכדי להוריד נתונים אל אפליקציות חיצוניות תואמות.
- בעל נורית חיווי צבעונית המעידה על מצבים שונים של המשדר החכם.
- מתקשר עם המכשיר הנייד.
- ניתן להפעלה או לכיבוי.



## שימוש יומיומי

- ✓ על מנת לקבל קריאות סוכר ומידע רציפים, בעת השימוש במשדר החכם היה מודע אל הדברים הבאים:
- ✓ יש לשאת את המשדר החכם כל הזמן, למעט כאשר הוא נטען.
- ✓ המשדר החכם עמיד למים בעומק של עד מטר אחד (3.2 רגל), למשך 30 דקות. חשיפה של המשדר החכם לתנאים מעבר לאלו שצוינו, תזיק לו ותגרום לך לאבד את האחריות שלו.
- ✓ ודא שלמשדר החכם יש מספיק מתח סוללה כל הזמן.
- ✓ בצע בדיקת כיוול בעזרת מד סוכר בדם כאשר תתבקש לעשות זאת.
- ✓ שים לב להתראות והודעות אשר תקבל מן המשדר החכם שלך ומהמכשיר הנייד.
- ✓ החלף את המדבקה על בסיס יומי.
- ✓ ניתן להסיר את המשדר החכם מן החלק העליון של הזרוע בכל עת, אך לא בזמן הכיול. זכור שלא נאספים נתונים כאשר המשדר החכם איננו מתקשר עם החיישן. כאשר אתה מניח את צידו האחורי של המשדר החכם שלך על גבי מיקום החיישן, יכול להיות שתידרשנה עד ל-10 דקות על מנת שהמשדר החכם יתקשר עם החיישן, ושקריאות תתחלנה להופיע באפליקציה.
- ✓ כאשר המשדר החכם והמכשיר הנייד לא נמצאים בטווח מתאים אחד מהשני, הנתונים הנאספים על-ידי המשדר החכם מאוחסנים ונשלחים לאפליקציה כאשר המכשיר הנייד והמשדר החכם יימצאו שוב באותו טווח.
- ✓ ניתן לשאת בבטחה את החיישן והמשדר החכם כאשר עוברים דרך גלאי מתכת בשדות תעופה. בזמן טיסה, המשדר החכם יתנהג בדומה לכל מכשיר Bluetooth אחר. הקפד לפעול בהתאם להנחיות הבטיחות הספציפיות שקבעה חברת התעופה.
- ✓ עד אשר המשדר החכם קיבל את קריאת הסוכר הראשונה שלו לאחר ההנחה על גבי החיישן, שורת המצב באפליקציה יציג אוסף נתונים. אתה יכול לראות את שורת מצב זה לאחר הטעינה של המשדר החכם.

**אזהרה:** אם המשדר החכם שלך ניזוק או סדוק, אל תשתמש בו, בגלל שישנה סכנה לתפקוד לקוי או סכנה חשמלית, דבר העלול להוביל לשוק חשמלי.

## הצמדת המשדר החכם לחיישן שהוחדר


יש להצמיד את המשדר החכם לעור ישירות מעל החיישן בעזרת המדבקה הדביקה החד פעמית. כל מדבקה מעוצבת כך שתוחלף בכל יום ויש לה צד נצמד אשר נצמד אל החלק האחורי של המשדר החכם וחלק נצמד מסיליקון אשר נצמד אל העור. פני העור לפני השטח של המשדר החכם צריכים להיות נקיים ויבשים כדי להבטיח שהמשטחים הדביקים של המדבקה אכן יידבקו. בימים הראשונים לאחר ההחדרה, אתה תישא את המשדר החכם מעל תחבושת ה-Tegaderm. השאר את תחבושת ה-Tegaderm במקומה לכמה זמן שהצוות הרפואי שלך ממליץ לך לעשות זאת. זרוק מדבקות משומשות בהתאם לתקנות המקומיות באזורך.

**הערה:** את המדבקות הדביקות תקבל מהצוות הרפואי שלך. מדבקות דביקות ניתנות הן בצבע ולבן והן שקופות. המדבקות הדביקות הלבנות מחוררות, דבר המאפשר ללחות להתרחק מן המקום. המדבקות השקופות מיועדות לשימוש במקרים בהם תרצה דיסקרטיות.

**זהירות: אם יש לך חששות לגבי תגובה אלרגית לסיליקון, צור קשר עם הצוות הרפואי שלך לפני השימוש. זרוק את המדבקה לאחר 24 שעות של שימוש.**

**2. ישר את המשדר החכם אל הצד הנדבק (המרכז) של המדבקה ולחץ בחוזקה על מנת להצמיד.**

- יש למקם את המשדר החכם כך שצדדיו פונים אל כנפי המדבקה (כמוצג).

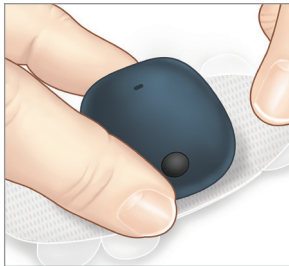


**1. קלף את הנייר האחורי עליו מופיע איור המשדר החכם Eversense E3. נסה שלא לגעת בחלק הנדבק במרכז.**



### 3. הסר את החלק האחורי הגדול יותר ומקם את המשדר החכם הישר מעל לחיישן.


- כדי להבטיח עוצמת אות אופטימלית, יש להניח את המשדר החכם ישירות מעל החיישן. ניתן לשפר את חוזק האות גם על ידי סיבוב של המשדר החכם מעל החיישן כך שהחיישן מתיישר באופן אנכי תחת המשדר החכם.

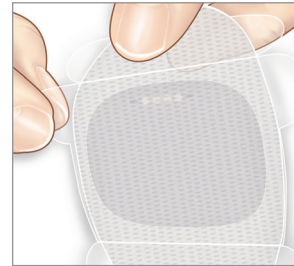

אתה תוכל לשאת את המשדר החכם מעל ל-Tegaderm עם מדבקת ה-Eversense לאחר ששלב החימום של 24 השעות מסתיים.

### 4. בדוק את החיבור בין המשדר החכם והחיישן.


- לחץ על **Menu > Placement Guide** (תפריט < מדריך מיקום).
- עיין ב-**Placement Guide** (מדריך מיקום) בעת צירוף המשדר החכם כדי להבטיח שקיים חיבור כלשהו בין החיישן לבין המשדר החכם.

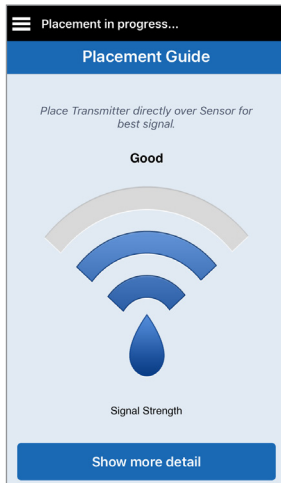

**הערה:** למידע נוסף אודות חוזק האות והעמדת המשדר, ראה מדריך מיקום – מסך פרטים נוספים בחלק קישור החיישן.


**5. לחץ על המדבקה בחוזקה מעל לשטח העור מעל לחיישן. אין להפעיל לחץ חזק בימים הראשונים לאחר ההחדרה.**

- יש למקם את המשדר החכם כך שכנפי המדבקה תהיינה על העור בצורה אופקית.

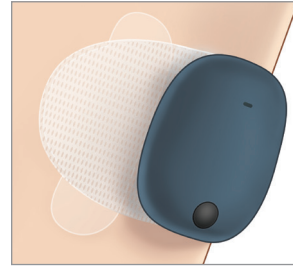

**6. השתמש בלשונית על מנת לקלף את הנייר שנותר.**

- החלק את המדבקה על גבי העור. וודא שהמדבקה שטוחה על גבי העור.

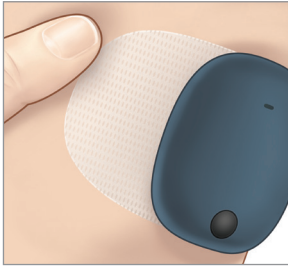


## הפעל וכבה את המשדר החכם

למשדר החכם יש לחצן הפעלה על מנת להפעיל ולכבות אותו. לחצן ההפעלה ושתי נוריות החיווי מציינים גם את רמת המתח שנותר בסוללה.

### 1. על מנת להפעיל את המשדר, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כחמש שניות.

- המשדר החכם ירטוט פעם אחת.
- שחרר את לחצן ההפעלה ונורית החיווי תהבהב פעם אחת על מנת להראות שהמשדר פועל.

בכל עת, אתה יכול ללחוץ על לחצן ההפעלה על מנת לראות האם המשדר החכם פועל. אם נורית החיווי נדלקת, המשדר החכם פועל. אם הנורית איננה נדלקת, המשדר החכם כבוי.

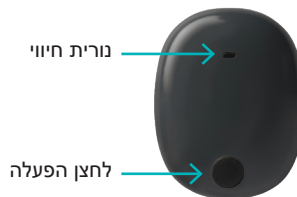

### 2. על מנת לכבות את המשדר, לחץ והחזק על לחצן ההפעלה למשך כחמש שניות.

- המשדר החכם ירטוט פעם אחת.
- שחרר את לחצן ההפעלה ונורית חיווי כתומה תהבהב פעם אחת על מנת להראות שהמשדר כבוי.

## טיפול ותחזוקת המשדר החכם

- שמור על המשדר החכם ועל עריסת הטעינה נקיים (ללא לכלוך הנראה לעין) ומוגנים כאשר לא נעשה בהם שימוש. בין השימושים נגב את החלק החיצוני במטלית כדי לשמור על הניקיון.
- צור קשר עם שירות הלקוחות עבור החלפת משדר אם אתה מקבל התרעת שגיאת סוללה.
- טען את המשדר החכם בכל פעם שמתח הסוללה חלש.
- השתמש אך ורק בספק הכוח שסופק לך עם המערכת כדי לטעון את סוללת המשדר החכם. שימוש בספק כוח שונה מזה שסופק על-ידי Senseonics עלול לבטל את האחריות על המשדר החכם. אין להשתמש בספק הכוח אם נגרם לו נזק בדרך כלשהי.
- על מנת לנקות את המשדר החכם שלך, העבר עליו מטלית לחה אשר הוטבלה במים; זרוק את המטלית בהתאם לתקנות המקומיות באזורך.
- זרוק את המשדר החכם ואת כל מרכיבי המערכת האחרים בהתאם לתקנות המקומיות באזורך.

## מחון סוללה

ניתן לבדוק את רמת המתח בסוללה של המשדר החכם באפליקציה, או במשדר החכם עצמו.

### עם האפליקציה:

- לחץ על **Menu > About > My Transmitter** (תפריט < אודות < המשדר שלי). גלול מטה אל קו רמת הסוללה שמציין את כמות מתח הסוללה שנתרה.

או

- בדוק את סמל הסוללה בפינה הימנית העליונה של מסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי). סמל סוללה אדום מראה שסוללת המשדר החכם ריקה.

### עם המשדר החכם:

- כאשר המשדר החכם פועל, לחץ ושחרר את לחצן ההפעלה. נורית החיווי תהבהב בירוק פעם אחת אם המתח בסוללה הוא לפחות 10%. מומלץ תמיד להטעין את המשדר החכם טעינה מלאה של 15 דקות על ידי שימוש בשקע קיר על מנת להבטיח טעינה מלאה. למידע נוסף על נוריות החיווי, עיין בדף הבא

## מחווני מצב נוריות חיווי

המשדר החכם מציג כמה מצבים שונים בהתבסס על צבע נורית החיווי.

### • בעת השימוש במשדר החכם:

פעולה	מצב	מצב נורית החיווי
קשר את המשדר החכם למכשיר נייד	מצב ניתן לגילוי	אור ירוק וכתום מתחלף כאשר מתבצעות 3 לחיצות על לחצן ההפעלה בתוך 5 שניות
לחץ והחזק את לחצן ההפעלה לכ-5 שניות על מנת להפעיל	המשדר החכם כבוי	לא מהבהב בעת לחיצה על לחצן ההפעלה
לא נדרשת פעולה מיידית	עוצמת סוללה של 10% - 90%	הנורית מהבהבת בירוק (פעם אחת) כאשר לחצן ההפעלה נלחץ
טען את הסוללה בהקדם	מתח סוללה נמוך, פחות מ-10% מתח סוללה נותר	הנורית מהבהבת בכתום (פעם אחת) כאשר לחצן ההפעלה נלחץ
בדוק את האפליקציה על גבי המכשיר הנייד שלך על מנת להבין את ההתרעה	ישנה התרעה	נורית החיווי כתומה למשך דקה אחת

### • בעת טעינת המשדר החכם:

פעולה	מצב סוללה	מצב נורית החיווי
טען במשך 15 דקות לפני שתנתק את המשדר מספק הכוח	טעונה 0% - 65%	כתום מלא או מהבהב בעת חיבור לכבל ה-USB
טען במשך 15 דקות לפני שתנתק את המשדר מספק הכוח	טעונה 65% - 100%	ירוק מלא בעת חיבור לכבל ה-USB

# 6. כיול המערכת

חלק זה מתאר את תהליך ותזמון הכיול של מערכת Eversense E3 CGM שלך.

**אזהרה:** אין להשתמש באתרי בדיקה חלופיים, לדוגמה, האמה, בעת הזנת ערכי סוכר בדם לצורך כיול.

6

כדי להבטיח ביצועים מיטביים, נדרש כיול שגרתי באמצעות קריאות דגימת דם מהאצבע ממד סוכר בדם. ניתן להשתמש בכל מד סוכר בדם זמין עבור הכיול. לאחר שהחיישן הוחדר ומקושר למשדר החכם, המערכת תתחיל תקופת חימום של 24 שעות. אין צורך בכיול במהלך תקופה זו.



יישנם שלושה שלבי כיול:

**שלב אתחול –** לאחר תקופת החימום הנמשכת 24 שעות, עליך להשלים 4 בדיקות כיול בעזרת דם מהאצבע, במרווחים של שתיים עד 12 שעות.

**שלב 2 כיולים יומיים –** לאחר שלב האתחול, יש לבצע בדיקת כיול באמצעות דגימת דם מהאצבע מדי 12 שעות למשך לפחות 21 ימים.

**שלב 1 כיול יומי –** המערכת תאתר אם יש צורך בכיול אחד או שני כיולים יומיים ותתריע אותך בנוגע לכך. במהלך 1 שלב כיול יומי, יש לבצע בדיקת כיול באמצעות דגימת דם מהאצבע מדי 24 שעות.

לאחר 21 הימים הראשונים, המערכת תיידע אותך אם יש צורך בכיול אחד או שני כיולים יומיים.

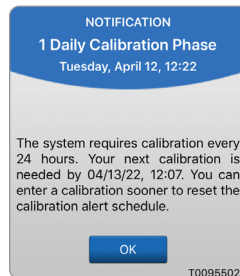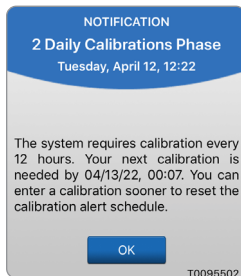

**אזהרה:** במהלך שלב 2 כיולים יומיים מערכת Eversense E3 CGM דורשת כיול מדי 12 שעות על מנת לספק קריאות מדויקות. במהלך שלב 1 כיול יומי מערכת Eversense E3 CGM דורשת כיול מדי 24 שעות. אל תשתמש בקריאות CGM על מנת לבצע החלטות טיפול אלא אם כן עקבת אחר ההוראות לכיול יומי.

הכיול השגרתי הוא בעל חשיבות רבה על מנת להבטיח את הביצועים הטובים ביותר של מערכת Eversense E3 CGM. העצות הבאות יכולות לעזור לך לשפר את מדידות הכיול שלך:

### עצות להבטחת כיול טוב:

- ✓ בצע את הכיול בזמנים בהם רמת הסוכר איננה משתנה באופן מהיר (לדוגמה, לפני ארוחות, לפני מתן של אינסולין).
- ✓ בצע את הכיול בזמנים בהם אתה יודע שלא תסיר את המשדר החכם במהלך 15 הדקות הבאות.
- ✓ שטוף את הידיים במים חמימים וסבון ונגב אותם ביסודיות לפני הקריאה ממד סוכר בדם. חשוב מאוד שהידיים תהיינה נקיות ויבשות בעת בדיקת הסוכר בדם.
- ✓ מלא תמיד אחר הוראות היצרן של מד הסוכר בדם על מנת לקבל קריאות מדויקות של רמת הסוכר בדם עבור הכיול.
- ✓ ודא שהקוד שעל הבקבוקון של מקלוני הבדיקה תואם לקוד של מד הסוכר בדם (אם נדרש קידוד).

### הכיול לא יושלם או שהתוצאות לא תתקבלנה אם:

- ✗ קריאת מד הסוכר בדם נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל.
- ✗ קריאת מד הסוכר בדם גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.
- ✗ קריאת מד הסוכר בדם נלקחה יותר מ-10 דקות לפני הזנת התוצאה באפליקציית Eversense.
- ✗ קריאת הסוכר של החיישן שונה באופן משמעותי מקריאת הסוכר בדם.
- ✗ המשדר החכם שלך הוסר או שהוא לא היה יכול לאסוף נתוני סוכר במהלך 15 הדקות שלאחר ההזנה של ערך הכיול שלך.

### א. שלב אתחול (לאחר תקופת חימום של 24 שעות)

בשלב זה נחוצות 4 בדיקות כיול בעזרת דם מהאצבע.

- 4 בדיקות הכיול תתבצענה במרווחים של שעתיים עד 12 שעות וכל 4 הבדיקות תתבצענה במהלך תקופה של 36 שעות. לאחר 8 שעות ללא הזנה של כיול, נתוני הסוכר לא יוצגו.
  - הכיול הראשון = 24 שעות לאחר קישור החיישן.
  - הכיול השני = שעתיים עד 12 שעות לאחר הכיול המוצלח הראשון.
  - הכיול השלישי = שעתיים עד 12 שעות לאחר הכיול המוצלח השני.
  - הכיול הרביעי = שעתיים עד 12 שעות לאחר הכיול המוצלח השלישי.
- קריאות הסוכר תתחלנה להיות מוצגות באפליקציה כמה דקות לאחר ההשלמה המוצלחת של הכיול השני.

**חשוב:** אם המשדר החכם שלך איננו מופעל ואיננו מחובר אל אפליקציית Eversense ואל החיישן, המערכת לא תוכל לבקש ממך לכייל.

### כניסה מחדש לשלב האתחול

הדברים הבאים יגרמו למערכת להיכנס מחדש אל שלב האתחול.

- אי השלמה של בדיקת כיול במהלך 12 שעות כחלק משלב האתחול.
- אי השלמה של 4 בדיקות כיול במהלך 36 שעות כחלק משלב האתחול.
- אי השלמה של הזנות הכיול הנדרשות במהלך שלב הכיול היומי.
  - כיול אחד מדי 12 שעות במהלך 21 הימים הראשונים של הנשיאה, וכל זמן בו המערכת נמצאת בשלב 2 כיולים יומיים.
  - כיול אחד מדי 24 שעות כל זמן בו המערכת נמצאת בשלב 1 כיול יומי
- כאשר מספר מדידות אחרונות של מד הסוכר בדם האחרונות שונות באופן משמעותי מערכי הסוכר הנקראים על ידי החיישן.
- אם סוללת המשדר החכם ריקה לתקופה של יותר מ-16 שעות.
- כאשר אתה מקבל התרעת בדיקת חיישן.
- שש שעות לאחר שאתה מקבל התרעת השהיית חיישן.

## ב. שלבי כיול יומי



יישנם שני שלבי כיול יומי.

2 שלבי כיול יומי הדורשים בדיקת מד סוכר בדם מדי 12 שעות. שלב הכיול היומי מתחיל לאחר השלמה מוצלחת של שלב האתחול.

- 12 שעות לאחר הכיול האחרון המוצלח שלך, המערכת תבקש ממך לבצע כיול.
- אתה יכול לבחור להזין כיולים בתדירות גבוהה יותר. יש להזין כיולים יומיים לפחות במרווח של שעה אחת.
- אם אתה לא מבצע כיול במהלך 16 שעות, אתה תקבל התרעה שעבר זמן הכיול וקריאות סוכר לא תוצגנה עד אשר יוזן ערך כיול. לאחר 24 שעות ללא כיול, אתה תקבל התרעה כיול פג תוקף והמערכת תחזור אל שלב האתחול.

1 שלב כיול יומי הדורש בדיקת מד סוכר בדם מדי 24 שעות.

- 24 שעות לאחר הכיול האחרון המוצלח שלך, המערכת תבקש ממך לבצע כיול.
- אתה יכול לבחור להזין כיולים בתדירות גבוהה יותר. יש להזין כיולים יומיים לפחות במרווח של שעה אחת.
- אם אתה לא מבצע כיול במהלך 28 שעות, אתה תקבל התרעה שעבר זמן הכיול וקריאות סוכר לא תוצגנה עד אשר יוזן ערך כיול. לאחר 40 שעות ללא כיול, אתה תקבל התרעה כיול פג תוקף והמערכת תחזור אל שלב האתחול.

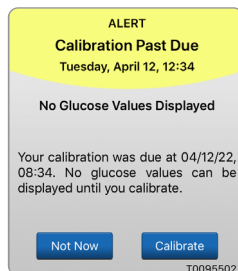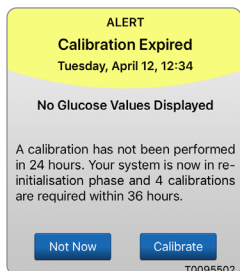

**אזהרה:** התרעות ותנאים מסוימים ימנעו את תצוגת נתוני הסוכר. במהלך תקופות אלו, עליך להשתמש במד סוכר ביתי בדם על מנת לבצע החלטות טיפול. עליך לקרוא בזהירות את חלק ההתרעות וההודעות בתוך המדריך למשתמש על מנת להבין תנאים אלו.

**הערה:** אם ערך מוזן של כיול שונה מאוד מערך קריאת סוכר אשר בוצע על ידי המערכת, אתה תקבל הודעת כייל עכשיו כשעה אחת לאחר מכן. התרעת כייל עכשיו תוצג 11 עד 12 שעות לאחר מכן, ללא קשר לשלב הכיול היומי בו נמצאת המערכת. במקרה זה, אם לא תבצע כיול תוך 16 שעות, קריאות הסוכר לא תוצגנה. לאחר 24 שעות ללא כיול, המערכת תחזור אל שלב האתחול.

אזהרה: כייל תמיד את המערכת באמצעות דגימות דם מהאצבע. אין להשתמש בקריאת סוכר בדם מאתר חלופי (לדוגמה, האמה או כרית כף היד) לכיול המערכת.

הערה: אתה יכול להזין קריאות כיול נוספות אם המרווח בין כל כיול הוא לפחות שעה אחת.

## 1. אתה יכול להזין את ערך הכיול על ידי לחיצה על Calibrate (כייל) מן התפריט הראשי או מתוך התרעת או הודעת כייל עכשיו.

6

Glucose Within Target Levels	
<b>Calibrate</b>	Submit
Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.	
Time	14:05 >
Glucose	>
Notes	>
Current Phase	2 Daily Calibrations
Next Scheduled Calibration Time	
	Tomorrow 00:27
Days Since Insertion: 4	
> Calibration Tips	

NOTIFICATION	
<b>Calibrate Now</b>	
Tuesday, April 12, 11:47 am	
Your calibration is due. Please perform a fingerstick blood glucose meter calibration now.	
Not Now	Calibrate
T0095502	

ALERT	
<b>Calibrate Now</b>	
Tuesday, April 12, 12:33	
In 4 hours, your calibration will be past due and no glucose will be displayed. Please enter a fingerstick blood glucose calibration now.	
Not Now	Calibrate
T0095502	

Glucose Within Target Levels	
	Enter the from you
Joe Smith	Time
My Glucose	Glucose
<b>Calibrate</b>	Notes
Alert History	Current
Event Log	Next S
Reports	Today
Share My Data	Days S
Placement Guide	> Calib
Connect	
Settings	

### 3. לחץ על **Glucose** (סוכר) והזן את הערך מבדיקת הסוכר בדם באמצעות דגימת הדם מהאצבע.


- לחץ על **Done** (בוצע).
- לחץ על **Notes** (הערות) על מנת להזין הערות.
- לחץ על **Done** (בוצע).

Glucose Within Target Levels	
Calibrate	Submit
<i>Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.</i>	
Time	14:06 >
Glucose	105 mg/dL >
Notes	>
Cancel	Glucose Done
	102
	103
	104
	<b>105</b>
	106
	107
	108

Glucose Within Target Levels	
Calibrate	Submit
<i>Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.</i>	
Time	14:05 >
Glucose	>
Notes	>
Current Phase	2 Daily Calibrations
Next Scheduled Calibration Time	
Tomorrow 00:27	
Days Since Insertion: 4	
> Calibration Tips	

**הערה:** אתה לא יכול להזין ערך כיול אשר בוצע לפני יותר מ-10 דקות.

### 2. קבל קריאה של דגימת דם מהאצבע ממד הסוכר בדם שלך.

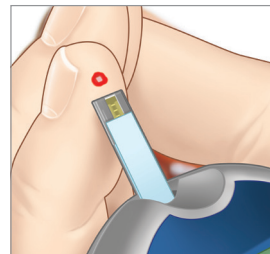


**6. MY GLUCOSE** מסך  
(הסוכר שלי) יופיע עם  
סמל טיפת דם אפורה  
כדי לזהות את הכיול  
באמצעות דגימת  
דם מהאצבע.

טיפת הדם תהפוך לאדומה  
כאשר ערך הכיול יתקבל.




**5. CALIBRATION IN PROGRESS** מסך  
(מתבצע כיול) יופיע.  
• לחץ על OK (אישור).

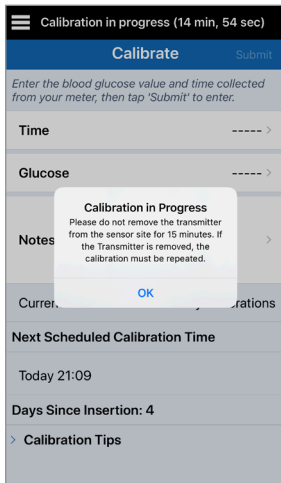

**4. CALIBRATE** מסך (כיול)  
מראה כעת את הזמן ואת  
קריאת הסוכר שהזנת. אם  
הנתונים לא נכונים, חזור  
על שלב 3.

• כאשר הנתונים יהיו נכונים,  
לחץ על **Submit** (הגש).

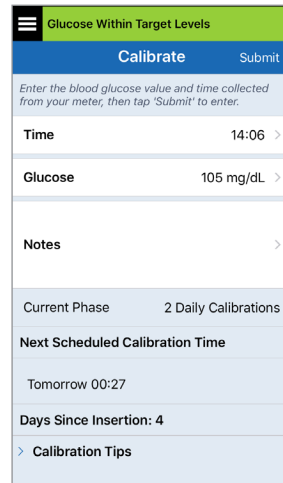

**חשוב:** אין להסיר את המשדר החכם מעל החיישן למשך 5 דקות לפחות לפני הבדיקה ועד 15 דקות לאחר הבדיקה כאשר הכיול מתבצע. תוכל לראות מתי הכיול הושלם בשורת המצב בחלק העליון של המסך. אם המשדר החכם הוסר לפני סיום הכיול, אתה תתבקש לבצע כיול חוזר.

צבעי סמל הכיול מראים את מצב ערך הכיול המוזן שלך. ראה טבלה למטה.

**הערה:** ייתכן שיהיו תנאים בהם תוצאת הכיול שלך לא תתקבל.

**הכיול לא יתקבל אם:**

- ✘ קריאת מד הסוכר בדם נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל.
- ✘ קריאת מד הסוכר בדם גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.

**Calibration Cannot be Used**  
 Blood glucose values more than 400 mg/dL cannot be used for calibration. Please take appropriate action and calibrate again when glucose is between 40 and 400 mg/dL. This entry will be logged as a BG entry.

OK

- ✘ המשדר החכם שלך הוסר או שהוא לא היה יכול לאסוף נתוני סוכר במהלך 15 הדקות שלאחר ההזנה של ערך הכיול שלך.

6

תיאור	מצב
מוצג בזמן 15 הדקות הראשונות לאחר שהזנת ערך כיול. אין להסיר את המשדר במהלך זמן זה. הסמל יכול להפוך לאדום, שחור או כחול כאשר כבר לא מתבצע כיול.	מתבצע כיול 
מוצג לאחר 15 הדקות הראשונות אם הכיול התקבל.	הכיול התקבל 
מוצג כאשר המשדר מוסר מעל לחיישן במהלך 15 דקות בהן מתבצע הכיול. יהיה צורך בערך כיול חדש.	כיול לא הושלם 
מוצג אם ערך הכיול המוזן נמוך מ-40 מ"ג/ד"ל או גבוה מ-400 מ"ג/ד"ל. הערך המוזן יישמר כערך מד סוכר בדם. כייל שוב כאשר ערך מד הסוכר בדם הוא בין 40 מ"ג/ד"ל ובין 400 מ"ג/ד"ל.	לא ניתן להשתמש בכיול 
מוצג כאשר ערך ידני של סוכר בדם מוזן באמצעות יומן האירועים.	הזנת אירוע סוכר בדם 

# 7. השימוש באפליקציה

חלק זה מתאר את אפליקציית Eversense כולל את המסך הראשי, גרף המגמה, חצי המגמה ואת מסך התפריט.

האפליקציה מנהלת תקשורת עם המשדר החכם לקבלה והצגה של נתוני הסוכר, המגמות, הגרפים וההתרעות. האפליקציה גם מאחסנת את היסטוריית הסוכר שלך לתקופה של עד 90 ימים.

**הערה:** אם אתה יוצא מאפליקציית Eversense, המשדר החכם שלך לא ישלח יותר נתוני סוכר לאפליקציה עד אשר תיכנס אליה שוב.



מסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי) מעניק לך גישה מהירה אל:

- מדידות בזמן אמת של רמות הסוכר בעזרת החיישן.
- שיעור וכיוון שינוי רמות הסוכר שלך.
- מגמות גרפיות של רמות הסוכר שלך.
- התרעות (היפוגליקמיה או היפרגליקמיה).
- אירועים כגון ארוחות, פעילות גופנית ותרופות.

**הערה:** חיבור אינטרנט אלחוטי דרוש על מנת להוריד או לעדכן את אפליקציית Eversense.



## ניהול חשבון Eversense

למטרות בטיחות, אם אתה מזין ססמה שגויה שלוש פעמים עוקבות באפליקציה, החשבון שלך יינעל למשך 30 דקות. במהלך זמן זה, לא תהיה לך גישה אל נתוני ה-CGM שלך המנוטרים מרחוק.

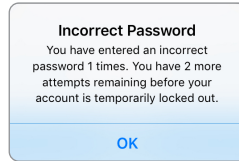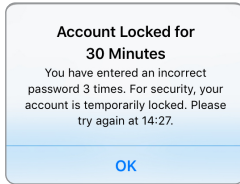


**זהירות: אם אין לך גישה אל נתוני ה-CGM שלך, עליך לנטר את הסוכר שלך על ידי שימוש במד סוכר בדם.**

האפליקציה לנייד Eversense תבקש לבדוק מעת לעת את מידע הכניסה שלך אל המערכת על מנת לאשר שהם לא השתנו דרך חשבון ה-Eversense DMS שלך.

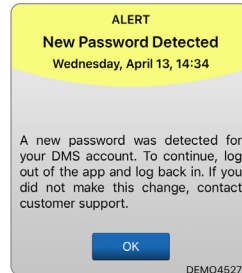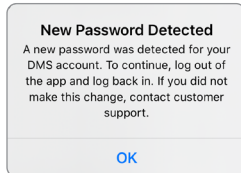

אם תשנה את סממת חשבון ה-Eversense ממסך הכניסה למערכת DMS או מעמוד שינוי הססמה ב-DMS, עליך לצאת מתוך אפליקציית Eversense ולהיכנס שוב אל המערכת על ידי שימוש בססמה החדשה שלך. אם הססמאות אינן מתאימות, אפליקציית Eversense תודיע לך על כך ותיידע אותך שחלק מן המאפיינים אינם זמינים, כולל סנכרון הנתונים אל תוך חשבון ה-DMS שלך, חוסר היכולת להוסיף משתמשי Eversense NOW למעגל שלך, וחוסר היכולת לבצע שינויים בתמונת הפרופיל שלך.

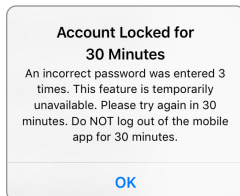

אם הזנת ססמה שגויה שלוש פעמים בעמוד הכניסה אל מערכת ה-DMS שלך, חלק ממאפייני האפליקציה יכולים שלא להיות זמינים במשך 30 דקות, כולל סנכרון הנתונים אל תוך חשבון ה-DMS שלך, חוסר היכולת להוסיף משתמשי Eversense NOW למעגל שלך, וחוסר היכולת לבצע שינויים בתמונת הפרופיל שלך. אין לצאת מן המערכת במהלך זמן זה.

## בדוק את הגדרות המכשיר הנייד שלך

כדי להשתמש במערכת Eversense E3 CGM, תזדקק למכשיר נייד (לדוגמה, טלפון חכם). חשוב מאוד שהגדרות המכשיר הנייד שלך נכונות על מנת להבטיח תצוגה מדויקת של נתוני הסוכר באפליקציה. פעל בהתאם להוראות היצרן של המכשיר הנייד להגדרת הנתונים הבאים:

- שעה ותאריך.
- Bluetooth פועל (פתוח).
- הודעות פועלות.
- הסוללה טעונה.
- אזור גאוגרפי.
- שפה.
- המכשיר הנייד לא צריך להיות במצב רטט.
- מצב 'נא לא להפריע' צריך להיות כבוי, חלק מן האפליקציות DELETE כגון מצב נהיגה, עלולות להפעיל באופן אוטומטי את מצב 'נא לא להפריע'. אנא עיין במדריך ההוראות עבור המכשיר הנייד שלך למידע נוסף.
- אם המכשיר הנייד שלך נמצא במצב 'נא לא להפריע', אתה לא תוכל לשמוע הודעות המגיעות מאפליקציית Eversense\*.

\* עבור iOS 12 או מעל, ו-אנדרואיד 6 ומעלה, אתה יכול לאפשר להתרעות הסוכר הנמוכות ולהתרעות הסוכר הנמוכות שלא נמצאות בטווח של אפליקציית Eversense לעבור מעל להגדרות הצליל של הטלפון שלך. ראה הגדרות צליל למידע נוסף.

## הכרת מסך "My Glucose" (הסוכר שלי)

מסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי) הוא מסך התצוגה העיקרי של האפליקציה. הוא מציג מגוון נתונים, כולל קריאות הסוכר מהחיישן, חצים המציינים את הכיוון והקצב של השינוי, גרף מגמה, אירועים, כוילים, התרעות והודעות.



לפני כל החלטת טיפול, עליך לקחת בחשבון את ערך הסוכר המגיע מן החיישן, את גרף המגמה, את חץ המגמה וכל התרעה המגיעה ממערכת ה-Eversense E3 CGM. אם חץ המגמה אינו מוצג, למערכת אין מספיק נתונים על מנת להציג את כיוון ושיעור השינוי. אתה לא יכול לקחת החלטות טיפול המתבססות רק על ערך הסוכר בחיישן.

## הערה:






- אתה יכול לראות צילום של המידע המגיע מאפליקציית Eversense על גבי מכשירי ה-iOS או האנדרואיד שלך. למידע בנוגע לניהול הוידג'טים, עיין במדריך למשתמש עבור המכשיר הנייד שלך. הוידג'ט של Eversense אינו זמין בכל מערכות ההפעלה.
- ניתן להציג את מסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי) לרוחב כדי לגשת אל לחצני קיצור להצגת 7, 14, 30 או 90 ימים, וניתן לשלוח תצוגה זו בדוא"ל בהקשה אחת.

7

שורת מצב	מספק מידע חשוב אודות רמת הסוכר הנוכחית שלך ומצב המערכת.
מספר זיהוי עבור המשדר החכם	זהו המשדר החכם בו אתה משתמש כעת. אתה יכול לשנות את השם על ידי הקשה על <b>Settings &gt; System</b> (הגדרות > מערכת).
קריאת סוכר נוכחית	רמת סוכר נוכחית בזמן אמת. רמה זו מתעדכנת כל 5 דקות.
תאריך ושעה	התאריך והשעה הנוכחיים. תוכל לגלול שמאלה או ימינה כדי לראות תאריכים ושעות שונים.
עוצמת סוללת המשדר החכם	מראה את המתח הנותר בסוללת המשדר החכם.
החיבור של המשדר החכם	מציין את עוצמת החיבור של המשדר החכם לחיישן או עם המכשיר הנייד.
חץ נגמה	מציג את הכיוון שאליו נעות רמות הסוכר.
יחידת מידה	זוהי יחידת המידה המשמשת לתצוגת כל נתוני הסוכר.
רמת התרעה לרמות סוכר נמוכות/גבוהות	הרמות שהוגדרו עבור התרעות רמות הסוכר הנמוכות והגבוהות.
רמת יעד לרמות סוכר נמוכות/גבוהות	הרמות שהוגדרו עבור יעדי רמות הסוכר הנמוכות והגבוהות (טווח יעד).

מראה אירועים מרובים שהתרחשו בו זמנית.	<b>סמל אירועים מרובים</b>			
מראה אירועים שהוזנו באופן ידני (לדוגמה, פעילות גופנית). למידע נוסף, ראה <b>רישום אירועים</b> .	<b>סמל אירוע</b>			
מציין מצב כניסת כיוול.	<b>סמלי כיוול</b>			
רמות הסוכר לאורך זמן. תוכל לגלול אחורה וקדימה כדי לראות את המגמות. לחלופין, תוכל להגדיל את התצוגה כדי לראות נתונים של 3 שעות או להקטין את התצוגה כדי לראות נתונים של עד 3 ימים.	<b>גרף מגמת רמת הסוכר</b>			
<p>מספק ניווט מהיר לחלקים השונים של אפליקציית Eversense:</p> <table border="0" data-bbox="270 380 850 616"> <tr> <td>Settings (הגדרות) אודות</td> <td>Reports (דוחות) Share My Data (שתף את הנתונים שלי) Placement Guide (מדריך מיקום) חבר</td> <td>My Glucose (הסוכר שלי) Calibrate (כייל) היסטוריית התרעות יומן אירועים</td> </tr> </table>	Settings (הגדרות) אודות	Reports (דוחות) Share My Data (שתף את הנתונים שלי) Placement Guide (מדריך מיקום) חבר	My Glucose (הסוכר שלי) Calibrate (כייל) היסטוריית התרעות יומן אירועים	<b>תפריט</b>
Settings (הגדרות) אודות	Reports (דוחות) Share My Data (שתף את הנתונים שלי) Placement Guide (מדריך מיקום) חבר	My Glucose (הסוכר שלי) Calibrate (כייל) היסטוריית התרעות יומן אירועים		

ישנם 5 חצי מגמה שונים המראים את הכיוון הנוכחי של רמות הסוכר שלך, ואת המהירות בה הן משתנות.

עלייה או ירידה הדרגתית של רמות סוכר, הנופלות או עולות בשיעור בין 0.0 מ"ג/ד"ל ו-1.0 מ"ג/ד"ל דקה.	
עלייה מתונה של רמות הסוכר, העולות בשיעור בין 1.0 מ"ג/ד"ל ו-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.	
ירידה מתונה של רמות הסוכר, הנופלות בשיעור בין 1.0 מ"ג/ד"ל ו-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.	
עלייה מאוד מהירה של רמות הסוכר, העולות בשיעור של יותר מ-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.	
ירידה מאוד מהירה של רמות הסוכר, הנופלות בשיעור של יותר מ-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.	

7

האפליקציה עושה שימוש ב-20 הדקות האחרונות של ניטור רמות סוכר רציף על מנת לחשב את מגמות רמות הסוכר.

כאשר אין מספיק ערכי חיישן זמינים על מנת לחשב חץ מגמה, הוא לא יוצג וערך הסוכר יהיה בצבע אפור ולא בצבע שחור.

לפני כל החלטת טיפול, עליך לקחת בחשבון את ערך הסוכר המגיע מן החיישן, את גרף המגמה, את חץ המגמה וכל התרעה המגיעה ממערכת ה-Eversense E3 CGM. אם חץ המגמה איננו מוצג, למערכת אין מספיק נתונים על מנת להציג את כיוון ושיעור השינוי. אתה לא יכול לקחת החלטות טיפול המתבססות רק על ערך הסוכר בחיישן.

## להבין את החלטות הטיפול עם ה-CGM

קרא את כל המדריך למשתמש למערכת Eversense E3 CGM ושים לב שאתה מבין מתי עליך ומתי אין עליך לבצע החלטות טיפול על בסיס מידע מה-CGM שלך. לפני שאתה מתחיל את השימוש ב-Eversense E3 עבור החלטות טיפול, שוחח עם איש הצוות הרפואי שלך בנוגע להבנה על הצורות בהן אוכל, אינסולין, תרופות, לחץ ופעילות גופנית ישפיעו על הסוכר שלך.

### חשוב:

- אם התסמינים שלך אינם מתאימים למידע הסוכר בחיישן המוצג, או אם האפליקציה לא מציגה הן את הערך והן את חץ המגמה עבור הסוכר, השתמש במד הסוכר שלך בדם על מנת לבצע החלטות טיפול.
- השתמש במד הסוכר בדם שלך על מנת לבצע החלטות טיפול עד אשר תבין איך Eversense E3 עובדת בשבילך. הדבר יכול לקחת ימים, שבועות או אפילו חודשים עד שתרגיש בנוח להשתמש בנתוני ה-CGM שלך עבור החלטות טיפול.

קח את הזמן שלך ומלא אחר המלצות איש הצוות הרפואי שלך לגבי הזמן בו יש להשתמש ב-Eversense E3 במקום במד הסוכר בדם שלך.

### רמות סוכר מהחיישן ורמות סוכר בדם

הסוכר בחיישן נמדד בנוזל הבין-תאי, לא בדם. בגלל עובדה זו, רמות הסוכר בחיישן עלולות להיות בעיכוב אחר רמות הסוכר בדם. לדוגמה, כאשר חץ מגמת ה-CGM שלך מראה ירידת סוכר מאוד מהירה, רמת הסוכר שלך בדם עלולה להיות נמוכה יותר מן המספר המוצג; או כאשר חץ מגמת ה-CGM שלך מראה עלייה מהירה מאוד, רמת הסוכר שלך בדם עלולה להיות גבוהה יותר מן המספר המוצג דוגמאות אלו תתרחשנה בתדירות גבוהה יותר כאשר רמות הסוכר שלך משתנות במהירות, כגון לאחר ארוחה, לאחר מנה של אינסולין או במהלך ולאחר פעילות גופנית. לחץ, מחלה ואפילו כמה מן התרופות אותן אתה נוטל, עלולים גם הם להשפיע על הסוכר שלך. לפעמים, החלטת הטיפול הנכונה היא להמתין ולבדוק את נתוני ה-CGM שלך בתדירות גבוהה לפני נקיטת פעולה.

## זמן נשיאה מוקדם

במהלך 24 השעות של שלב החימום, רמות סוכר אינן מוצגות. כמו כן, במהלך זמן הנשיאה המוקדם כאשר מיקום ההחדרה שלך מתרפא, רמות הסוכר שלך בחיישן עלולות לא להיות תואמות אל רמות הסוכר שלך בדם קרוב כמו שהן תהיינה לאחר שהריפוי יסתיים. השתמש במד הסוכר בדם שלך להחלטות טיפול במהלך שלב החימום ועד אשר אתה בטוח ברמות ה-CGM שלך. זכור תמיד, אם הדרך בה אתה מרגיש איננה תואמת אל רמות הסוכר ואת חץ המגמה שלך, השתמש במד הסוכר בדם שלך.

## תקשורת Bluetooth

המשדר החכם מתקשר באופן אלחוטי עם המכשיר הנייד שלך באמצעות Bluetooth על מנת להציג את רמות הסוכר שלך. אם התקשורת בין המשדר החכם שלך ובין המכשיר הנייד שלך מתנתקת, אתה לא תוכל לראות רמות סוכר או חץ מגמה. השתמש במד הסוכר בדם שלך להחלטות טיפול אם המשדר החכם שלך איננו מתקשר עם המכשיר הנייד שלך.

## התרעת רטט על גבי הגוף

המשדר החכם שלך מספק התרעות רטט אם עברת מעבר לרמות התרעות הסוכר אותן הגדרת. יחד עם זאת, אין להשתמש בהתרעות רטט על גבי הגוף על מנת לבצע החלטות טיפול. כאשר אתה מקבל התרעת רטט על גבי הגוף, בדוק את קריאת הסוכר שלך ואת חץ המגמה על גבי אפליקציית ה-Eversense שלך.

## ניטור מרחוק Eversense NOW

אין לבצע החלטות טיפול ממידע שהתקבל מה-CGM המוצג על גבי האפליקציה לניטור מרחוק Eversense NOW. הניטור מרחוק מסתמך על נתונים הנשלחים מן המכשיר הנייד שלך דרך ענן Eversense ואז אל אפליקציית Eversense NOW. ניתוקים של חיבורים אלו יעכבו את הנתונים המוצגים ב-Eversense NOW. ניתן להשתמש רק במידע מה-CGM הנשלח ישירות מן המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלך לביצוע של החלטות טיפול.

### ארוחות

סוגים שונים של ארוחות עלולים להשפיע על רמות הסוכר שלך ועל חצי המגמה, כמו גם תנאים כגון התרוקנות מעיים מאוחרת. חלק מן המאכלים יעלו את הסוכר שלך מהר יותר מאחרים. לפני השימוש במידע ה-CGM שלך לביצוע של החלטות טיפול, שוחח עם איש צוות הבריאות שלך בנוגע לניהול של מנות אינסולין עבור סוגים שונים של אוכל ואיך לחשב באופן מדויק את הפחמימות שלך.

### אינסולין

אינסולין איננו משפיע מידית על הסוכר שלך. לדוגמה, בהתאם למותג האינסולין המהיר בו משתמשים, התחלת הפעולה שלו יכולה לקחת בין 5 ל-15 דקות, כאשר השיא עלול להתרחש בין שעה לשעתיים לאחר הנטילה והכל לפרק זמן של 4-6 שעות. היה בטוח שאתה מבין את הדרך בה אתה מצפה מן האינסולין שלך להתחיל להוריד את הסוכר שלך, מתי מתרחשת היעילות המקסימלית שלו וכמה זמן הוא נשאר בגוף שלך כאשר הוא ממשיך להוריד את הסוכר. עבודה עם איש הצוות הרפואי שלך על מנת להבין את ההתחלה, השיא ומשך פעולת האינסולין שלך תעזור לך למנוע הצטברות אינסולין. הצטברות של אינסולין תקרה כאשר אתה נוטל מנת אינסולין בעוד המנה הקודמת עדיין ממשיכה להוריד את הסוכר שלך. התוצאה עלולה להיות היפוגליקמיה חמורה. במקום להגיב ולקחת אינסולין על בסיס ערך CGM גבוה, היה בטוח שאתה לוקח בחשבון האם האינסולין מן המנה האחרונה שנטלת עדיין מורידה את הסוכר שלך באופן פעיל.

### פעילות גופנית

אפילו פעילות גופנית קלה, אם היא איננה חלק מן השגרה שלך, עלולה לשנות את רמות הסוכר שלך בקצב מהיר יותר מאשר בדרך כלל. אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך ה-CGM, או ערך ה-CGM וחץ המגמה שלך אינם כפי שאתה מצפה מהם להיות, השתמש במד הסוכר בדם שלך על מנת לבצע החלטות טיפול. חלק מהאנשים חווים התחלה של היפוגליקמיה שעות לאחר הפעילות הגופנית. אתה צריך לעקוב אחר המלצות הצוות הרפואי שלך למתן אינסולין לאחר פעילות גופנית בכדי למנוע רמה סוכר נמוכה.

כאשר אתה חולה או לחוץ, ישנה השפעה על הסוכר שלך ויש לקחת זאת בחשבון עבור ביצוע של החלטות טיפול. זכור שהלחץ איננו תמיד שלילי. אתה יכול למצוא שרמות הסוכר שלך משתנות כאשר אתה מתחיל בחופשה או כאשר אתה הולך לאירוע חברתי כיפי. הצוות הרפואי שלך יכול לעזור לך ליצור תוכנית עבור החלטות טיפול בזמנים בהם אתה חולה או מרגיש לחוץ.

## תרופות

הבן איך תרופות אותן אתה נוטל משפיעות על הסוכר שלך. חלק מתרופות הסוכרת פועלות על מנת להוריד את הסוכר שלך וחלק מן התרופות, כגון סטרואידים, עלולות להעלות את רמות הסוכר שלך. עם ה-Eversense E3, תרופות מסוג טטרציקלין עלולות באופן כוזב להוריד את רמות הסוכר שלך ואין עליך להסתמך על קריאות ה-CGM כאשר אתה נוטל תרופות מסוג זה. שוחח עם איש צוות הבריאות שלך אודות תרופות אותן אתה נוטל ועל הדברים אותם יש לקחת בחשבון בעת ביצוע של החלטות טיפול.

## התרעות הסוכר של Eversense E3

הצוות הרפואי שלך יעזור לך לקבוע את טווח היעד ואת רמות התרעות הסוכר המתאימות ביותר עבורך. שים לב להתרעות סוכר מה-Eversense E3 שלך – יכול להיות שיהיה צורך לבצע החלטת טיפול. כאשר אתה מקבל התרעה על רמת סוכר שאיננה בטוחה, ערך הסוכר בחיישן הוא מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל עם LO המוצג במקום המספר, או מעל ל-400 מ"ג/ד"ל עם HI המוצג במקום מספר. שאל את הצוות הרפואי שלך אודות כיצד הטיפול ברמת סוכר מאוד נמוכה או מאוד גבוהה יכול להיות שונה מדרך הטיפול הרגילה שלך והשתמש תמיד במד הסוכר בדם שלך על מנת לבצע החלטות טיפול כאשר מוצגות קריאות סוכר נמוכות או גבוהות.

## הבט אל העתיד




יש לקחת בחשבון את השעה ביום כאשר מבצעים החלטת טיפול מבוססת CGM, בדומה לדרך בה אתה עושה זאת כאשר אתה משתמש במד סוכר בדם. לדוגמה, אם רמת הסוכר שלך גבוהה והיא עולה לפני השינה, התאם את מנת האינסולין שלך בהתאם להמלצות הצוות הרפואי שלך. כמו כן, חשוב על דרך הטיפול אם אתה מתכנן פעילות גופנית או אם תשב בישיבה במהלך כל היום. יכול להיות שהצוות הרפואי שלך ימליץ לך להתאים את החלטות הטיפול שלך על בסיס מה שעומד לקרות על מנת למנוע רמת סוכר גבוהה או נמוכה.

# ביצוע של החלטות טיפול עם Eversense E3

עבור החלטת טיפול, עליך לקחת בחשבון:

- מידע אודות שורת מצב.
- ערך סוכר נוכחי בחיישן – ערך הסוכר הנוכחי אמור להיות מוצג בצבע שחור.
- חץ מגמה – חץ מגמה צריך להיות מוצג.
- מידע מגמה מעודכן והתרעות.



7

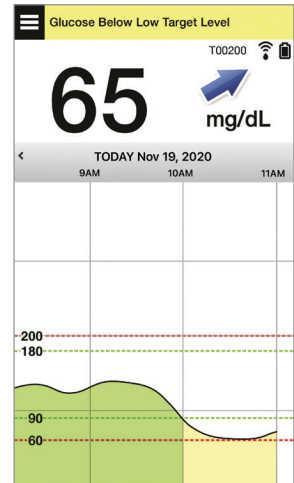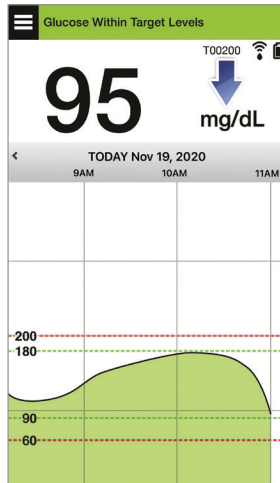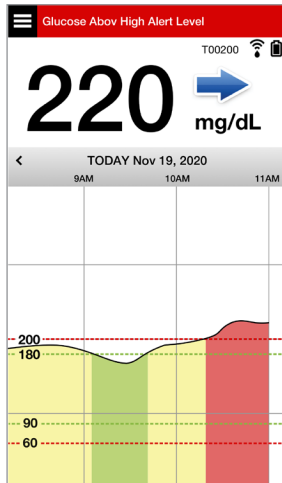

## מתי אין לבצע החלטות טיפול:

- לא מוצג ערך סוכר.
- לא מוצג חץ מגמה.
- התסמינים שלך לא מתאימים למידע הסוכר המוצג.
- ערך הסוכר בחיישן הנוכחי מוצג בצבע אפור.
- שורת המצב מוצגת בצבע כתום.
- אתה נוטל תרופות מסוג טרציקליין.

7

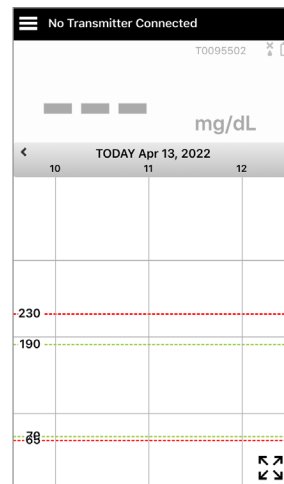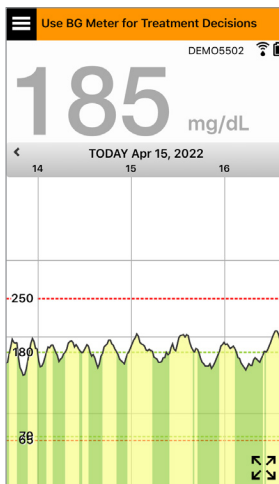

**הערה:** התייחס תמיד אל מידע הסוכר על גבי אפליקציית ה-Eversense CGM שלך על גבי הטלפון החכם שלך עבור ביצוע של החלטות טיפול. אין להשתמש בתצוגה משנית כגון Apple Watch או Eversense NOW.

## חיצו מגמה של Eversense E3 והחלטות טיפול

חיצו המגמה של Eversense E3 מראים את הכיוון ואת שיעור השינוי של רמות הסוכר שלך על מנת לתת לך מידע להיכן רמות הסוכר שלך מתקדמות. שוחח עם הצוות הרפואי שלך אודות השימוש בחיצו מגמה אשר יסייע לך לביצוע של החלטות טיפול. בדרך כלל, אם החץ פונה כלפי מטה, יכול להיות שתיקח בחשבון ליטול פחות אינסולין, ואם החץ פונה כלפי מעלה, אולי תיטול יותר. היה זהיר לא ליטול יותר מדי אינסולין בזמן קצר, דבר שיוביל לרמות סוכר נמוכות בעקבות ערמה של אינסולין. חיצו ה-Eversense E3 מתוארים למטה, ביחד עם הדרכים שיש להשתמש בהם עבור החלטות טיפול. שוחח עם איש צוות הבריאות שלך אודות ביצוע של התאמות לטיפולים המבוססים על חיצו מגמה. **לעולם אין לבצע החלטות טיפול על ידי שימוש ב-CGM כאשר לא מוצג כל חץ.**

7

Eversense E3 חץ מגמה		מה הוא מצוין	סוכר נמוך	סוכר גבוה	סוכר בטווח
ללא חץ מגמה		אין מספיק נתונים בכדי לחשב את כיוון מגמת הסוכר או את שיעור השינוי.	בצע בדיקת סוכר בדם מהאצבע באמצעות מד הסוכר בדם שלך לפני כל החלטת טיפול, אפילו אם רמות הסוכר שלך נמצאות בטווח.		
	הסוכר יורד בקצב מהיר (<math>2.0 </math> מ"ג/ד"ל/דקה).	הסוכר שלך יורד ב-30 מ"ג/ד"ל או יותר בתוך 15 דקות.	טפל באמצעות פחמימות וקח בחשבון אם סיימת לאחרונה פעילות גופנית, המתן ובדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדיר לפני ביצוע של החלטת טיפול.	אם נטלת לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, המתן ובדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדיר לפני ביצוע של החלטת טיפול.	טפל באמצעות פחמימות וקח בחשבון אם סיימת לאחרונה פעילות גופנית או אם נטלת יותר מדי אינסולין.
	הסוכר יורד בקצב בינוני (בין 1.0 ו-2.0 מ"ג/ד"ל/דקה).	הסוכר שלך יורד בין 15 ו-30 מ"ג/ד"ל בתוך 15 שניות.	טפל באמצעות פחמימות וקח בחשבון אם סיימת לאחרונה פעילות גופנית או אם נטלת יותר מדי אינסולין.		


Eversense E3 חץ מגמה		מה הוא מציין	סוכר נמוך	סוכר גבוה	סוכר בטווח
	הסוכר עולה בקצב מהיר ( $2.0 <$ מ"ג/ד"ל/לדקה).	הסוכר שלך עולה ב-30 מ"ג/ד"ל או יותר בתוך 15 דקות.	אם נטלת לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, המתן ובדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדיר לפני ביצוע של החלטת טיפול.	אם נטלת לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, המתן ובדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדיר.	אם נטלת לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, המתן ובדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדיר לפני ביצוע של החלטת טיפול.
	הסוכר עולה בקצב בינוני (בין 1.0 ו-2.0 מ"ג/ד"ל/לדקה).	הסוכר שלך עולה בין 15 ו-30 מ"ג/ד"ל בתוך 15 דקות.	אם נטלת לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, קח בחשבון התאמה של מנת האינסולין כלפי מעלה.	אם לא נטלת לאחרונה אינסולין, קח בחשבון התאמה של מנת האינסולין כלפי מעלה.	אם לא נטלת לאחרונה אינסולין או אם סיימת פעילות גופנית, קח בחשבון התאמה של מנת האינסולין כלפי מעלה.
	הסוכר משתנה בהדרגה (1.0 מ"ג/ד"ל/לדקה או פחות).	הסוכר שלך עולה או יורד עד 15 מ"ג/ד"ל בתוך 15 דקות.	קח בחשבון טיפול באמצעות פחמימות. אם נטלת לאחרונה אינסולין בדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדיר.	אם נטלת לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, המתן ובדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדיר.	ללא טיפול, אך אם נטלת לאחרונה אינסולין או אם אתה עומד לבצע פעילות גופנית, בדוק את ערך ה-CGM שלך ואת חץ המגמה באופן תדיר.
			קח בחשבון התאמה של מנת האינסולין כלפי מעלה.	אם לא נטלת לאחרונה אינסולין, קח בחשבון התאמה של מנת האינסולין כלפי מעלה.	

חלק זה מספק דוגמאות למצבים בהם אתה עלול להיתקל. חשוב מאוד לקחת בחשבון את הדברים שקרו ואת הדברים שעומדים לקרות בעת ביצוע של החלטות טיפול עם CGM. סקור את הדוגמאות הללו בזהירות וחשוב על הדברים אותם אתה צריך לקחת בחשבון לפני ביצוע של החלטות טיפול. אם אינך בטוח, תמיד בדוק את רמת הסוכר שלך בדם מהאצבע לפני ביצוע של החלטות טיפול.

**רמת הסוכר מתחת ליעד ברמה של 65, אך הרמה עולה במתינות. רמת הסוכר שלך יכולה להגיע ל-120 בתוך 30 דקות.**


**השעה היא 9 בבוקר והזרקת מנה של אינסולין עבור ארוחת הבוקר שלך בערך לפני שעתיים.**

- האם עליך להמתין ולשים לב לרמת הסוכר שלך ולחץ לפני ביצוע של החלטת טיפול?
- האם עליך לקחת בחשבון נטילת פחמימות בכדי לטפל ברמה הנמוכה כעת?

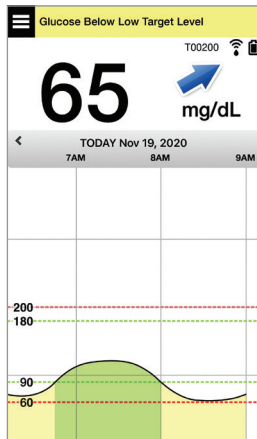

**השעה היא 7 בבוקר ואתה עומד לאכול ארוחת בוקר, ושיתית כוס קטנה של מיץ תפוזים כאשר התעוררת.**


- האם עליך לשקול לקחת קצת פחות אינסולין מאשר אתה נוטל בדרך כלל עם הארוחה שלך?
- האם עליך ליטול את כמות האינסולין הרגילה אותה אתה נוטל בארוחת הבוקר ולשים לב לרמת הסוכר שלך, לחץ ולדרוך בה אתה מרגיש?

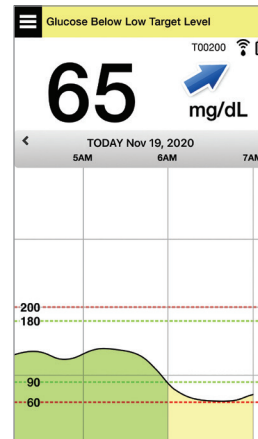

רמת הסוכר ביעד ברמה של 90, אך הרמה עולה במהירות. רמת הסוכר שלך יכולה להגיע ל-180 או יותר בתוך 45 דקות.


השעה היא 2 אה"צ ונטלת מנת אינסולין אשר תכסה את ארוחת הצהריים שלך ועוד טיפה יותר בגלל החץ אשר עלה במהירות, בערך לפני 90 דקות.

- בגלל שעברו רק 90 דקות ממנת האינסולין, האם עליך להמתין ולשים לב לרמת הסוכר ולחץ המגמה שלך?
- מהו זמן ההמתנה עליו המליץ הצוות הרפואי שלך בין מנות אינסולין בכדי למנוע הצטברות של אינסולין?

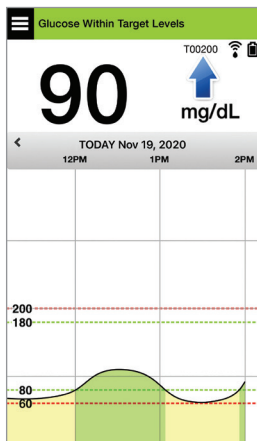

עכשיו צהריים, אתה עומד לאכול ארוחת צהריים.


- מה יכול לגרום לעליית רמת הסוכר?
- האם עליך לשקול לקחת יותר אינסולין מאשר אתה נוטל בדרך כלל עם הארוחה שלך?
- על איזו התאמה של מנת האינסולין המליץ הצוות הרפואי שלך עבור מצבים אלו?

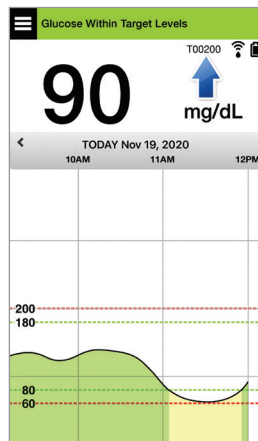

רמת הסוכר ביעד ברמה של 95, אך הרמה יורדת במהירות. רמת הסוכר שלך יכולה להגיע ל-65 או פחות בתוך 15 דקות.


סיימת כרגע את הפעילות הגופנית שלך.

- מהי הדרך עליה המליץ הצוות הרפואי שלך בכדי למנוע רמת סוכר נמוכה לאחר פעילות גופנית?
- שקול חטיף בכדי למנוע אירוע סוכר נמוך.
- שים לב לרמת הסוכר שלך, לחץ המגמה ולדרך בה אתה מרגיש.

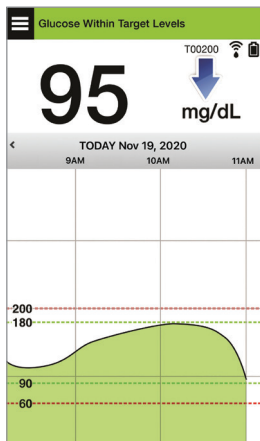

אתה עומד להתחיל בפעילות גופנית.


- מה יכול לגרום לירידה המהירה של רמת הסוכר?
- שקול לקחת חטיף בכדי למנוע אירוע סוכר נמוך.
- שקול את האפשרות לדחות את הפעילות הגופנית שלך עד אשר חץ המגמה ורמת הסוכר שלך יותר יציבים. שים לב לרמת הסוכר שלך, לחץ המגמה ולדרך בה אתה מרגיש.

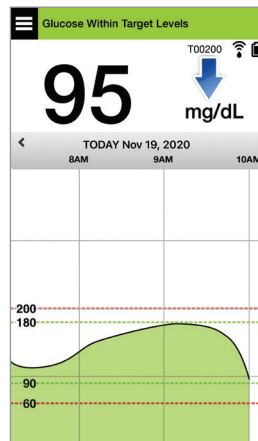

רמת הסוכר מעל רמת התרעה גבוהה של 220 והרמה משתנה בהדרגה. הסוכר שלך עשוי לרדת ל-190 או לעלות ל-250 בתוך 30 דקות.


השעה היא 10 בערב, אתה עומד ללכת לישון. עברו שעתיים וחצי מאז מנת האינסולין האחרונה שלך.

- מה יכול לגרום לרמת סוכר גבוהה זו?
- כמה לוקח בדרך כלל לאינסולין בו אתה משתמש לסיים ולהוריד את רמת הסוכר שלך?
- איזו רמת סוכר לפני השינה מומלצת על ידי הצוות הרפואי שלך?
- איך אתה בדרך כלל מטפל ברמות סוכר גבוהות לפני השינה?

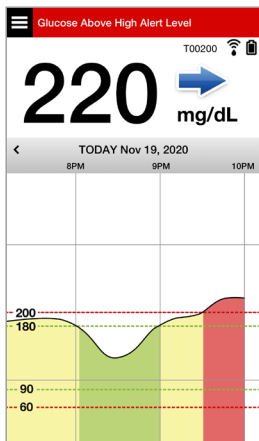

השעה היא 7 בערב, אתה עומד לאכול ארוחת ערב. עברו 6 שעות ממנת האינסולין שלך בצריכים.

- מה יכול לגרום לרמה כל כך גבוהה של סוכר לאחר הארוחה האחרונה שלך?
- האם יש לך יום לחוץ; האם אתה מרגיש טוב?
- האם עליך לקחת בחשבון יותר אינסולין או אכילה של פחות פחמימות מאשר אתה נוטל או אוכל בדרך כלל עם ארוחה זו?

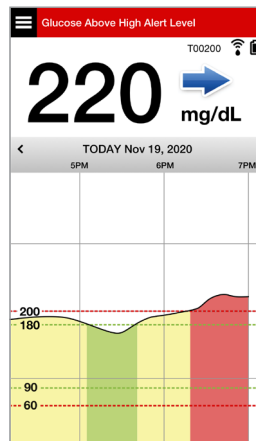


**זכור, אם אינך בטוח, בצע תמיד בדיקת סוכר מהאצבע באמצעות מד הסוכר בדם שלך לפני ביצוע של החלטת טיפול.**

## גרף מגמה

נעשה שימוש בגרף המגמה על מנת לראות ולבחון נתונים ומגמות היסטוריים של רמות סוכר לאורך זמן. הוא גם מציג סימנים עבור אירועים אותם הזנת באופן ידני אל תוך האפליקציה (לדוגמה, בדיקות כיול או פעילות גופנית).

ניתן להשתמש בגרף מגמה בכמה דרכים:

- סקירה מהירה של מצבך בהשוואה ליעדי הסוכר ורמות ההתרעות שהגדרת. הקווים המקווקווים האדומים מציגים את רמות ההתרעות לרמות סוכר גבוהות או נמוכות, והקווים המקווקווים הירוקים מציגים את רמות היעד לרמות סוכר גבוהות או נמוכות (טווח היעד שלך).
- אזורים מוצללים בגרף מקודדי צבעים בהתאם להגדרות רמות הסוכר אותן הזנת:

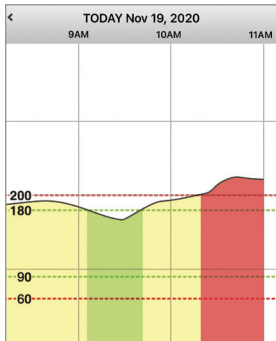

– ערכי רמות סוכר הנמצאים **מחוץ לרמות ההתרעות לרמות הסוכר שלך** יהיו אדומים.

– ערכי רמות סוכר הנמצאים **בתוך רמות היעד לרמות הסוכר שלך** יהיו ירוקים.

– ערכי רמות סוכר הנמצאים **בין ערכי רמות ההתרעה ורמות היעד עבור רמות הסוכר שלך** יהיו צהובים.



- לחץ והחזק כל נקודה על גבי קו הגרף על מנת לראות קריאת סוכר ספציפית לנקודת זמן מסוימת.
- לחץ על כל סימן על גבי מסך האפליקציה על מנת לקבל מידע נוסף בנוגע לאירוע או להתרעה.

- בצע תנועת צביטה פנימה והחוצה על המסך כדי להציג טווחי תאריך/שעה אחרים על גרף המגמה. תוכל להגדיל ולהקטין את התצוגה כדי לראות מידע של 3 שעות עד 3 ימים.
- על מנת לראות את נתוני גרף המגמה עבור תאריך שונה, לחץ על שדה התאריך על המסך והזן את התאריך הרצוי.
- אתה יכול לראות את גרף המגמה הן בכיוון אנכי והן בכיוון אופקי. בכיוון אופקי, ישנם לחצני קיצור על מנת לראות את מבטי 7, 14, 30 או 90 ימים.

**הערה:** כל נתוני הסוכר שלך יאוחסנו באפליקציה כל עוד יש לך זיכרון זמין במכשיר הנייד שלך.

## אפשרויות תפריט

סמל התפריט (☰) מופיע בפניה השמאלית העליונה של כל מסכי האפליקציה ומספק גלישה קלה למאפייני האפליקציה האחרים. פריטי התפריט הבאים זמינים:

תיאור	אפשרויות תפריט	
מסך האפליקציה הראשי שמציג את קריאת ה-CGM הנוכחית, את כיוון וקצב השינוי, גרף המגמה, אירועים והתרעות.	My Glucose (הסוכר שלי)	
הזן ערכי כיול של סוכר בדם.	Calibrate (כייל)	
סוקר את ההתרעות וההודעות בעבר. ראה תיאורי התרעות למידע נוסף.	Alert History (היסטוריית התרעות)	
הזן מידע בנוגע לפעולות כגון ערכי סוכר בדם, ארוחות, אינסולין, בריאות ופעילות גופנית. ראה יומן אירועים למידע נוסף.	Event Log (יומן אירועים)	
סקור דוחות שונים הנוגעים לנתוני ה-CGM שלך. ראה דוחות למידע נוסף.	Reports (דוחות)	
אפשר לאחרים לראות את נתוני קריאות הסוכר שלך דרך האפליקציה למכשיר נייד Eversense NOW.	Share My Data (שתף את הנתונים שלי)	
בדוק את התקשורת בין המשדר החכם והחיישן. השתמש במסך זה בכל פעם בה אתה מצמיד את המשדר החכם על מנת לוודא שהתבצעה תקשורת.	Placement Guide (מדריך מיקום)	
בצע או בדוק את החיבור בין המשדר החכם והמכשיר הנייד. נדרש חיבור Bluetooth על מנת לשלוח נתונים אל האפליקציה.	Connect (חבר)	
התאם באופן אישי הגדרות כגון רמות יעד עבור רמות הסוכר, רמות התרעה, צלילים ופרופיל זמני. ראה התאמה אישית של ההגדרות שלך למידע נוסף.	Settings (הגדרות)	
ראה מידע אודות מערכת ה-CGM שלך, כולל מספרי זיהוי עבור החיישן והמשדר החכם. שנה או מחק את תמונת הפרופיל שלך וצא מן המערכת.	About (אודות)	

# 8. התאמה אישית של ההגדרות שלך

חלק זה מתאר כיצד להתאים אישית את ההגדרות במערכת Eversense E3 CGM שלך.

- תחומים בהם תוכל להתאים אישית את הגדרות האפליקציה כוללים:
- **Glucose (סוכר)** – רמות סוכר וערכי שינוי אשר יגרמו להתרעה.
- **Calibration Reminders (תזכורות כיול)** – ניתן באופן אופציונלי לקבוע זמני תזכורת לכיול.
- **System (מערכת)** – מזהה או מאפשר לך להזין מידע מותאם אישית לגבי המערכת שלך.
- **Sound Settings (הגדרות צליל)** – שנה את הצללים עבור חלק מהתרעות הסוכר, הגדר זמני נודניק ו'נא לא להפריע'.
- **Temp Profile (פרופיל זמני)** – קבע פרופיל זמני עבור קריאות הסוכר.


## רמות סוכר

מערכת Eversense E3 CGM מיועדת לספק התרעות על המשדר החכם והמכשיר הנייד שלך כאשר רמות הסוכר מגיעות לרמות ההתרעה שהגדרת. תוכל להחליט על ההגדרות עבור התרעות הסוכר, היעדים וקצב השינוי בהתבסס על נתונים מהצוות הרפואי שלך.

**אזהרה:** ההתרעות על רמות נמוכות וגבוהות של סוכר מיועדות לסייע לך בניהול הסוכרת ואין להשתמש אך ורק בהן לזיהוי היפוגליקמיה או היפרגליקמיה. יש להשתמש תמיד בהתרעות ביחד עם מדדים אחרים של מצב הסוכר שלך כגון רמת הסוכר, מגמות, גרפים ועוד.

- התרעות עבור רמות סוכר נמוכות או גבוהות שונות מרמות היעד של רמות הסוכר שלך.
  - ההתרעות על רמות נמוכות וגבוהות של סוכר מודיעות לך באמצעות המכשיר הנייד והמסדר החכם כאשר הגעת אל ערך נמוך או גבוה מסוים.
  - יעדי הסוכר נמצאים בשימוש בדוחות ובגרפי קו כדי להציג לך את ביצועי רמות הסוכר בהשוואה ליעדים שהגדרת. לא תופעל התרעה כאשר תגיע לרמות היעד של הסוכר שקבעת. לא תופעל התרעה כאשר תגיע לרמות היעד של הסוכר שקבעת.
  - התרעות על רמות חיזוי של סוכר נמוכות או גבוהות תודענה לך על גבי המכשיר הנייד שלך ועל גבי המסדר החכם שלך כאשר אתה עלול להגיע לרמות היעד של הסוכר שקבעת.

במסך **Glucose Settings** (הגדרות סוכר), הקש על "סימן הקרט" ✓ על מנת להרחיב ולצמצם את אפשרויות ההגדרות.

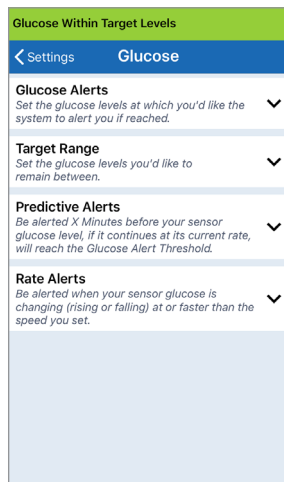

## הגדרה של רמות התרעות עבור רמות סוכר

מערכת Eversense E3 CGM תשלח לך התרעה כאשר רמות הסוכר שלך נמצאות מחוץ להגדרות ההתרעה אותן קבעת. אם הגעת לרמות ההתרעות הנמוכות או הגבוהות עבור רמות הסוכר שלך, המשדר החכם רוטט והאפליקציה מספקת התרעת צליל וכמו כן מציגה מסר על גבי המסך.



<p>נמוכה: 65 מ"ג/ד"ל גבוהה: 250 מ"ג/ד"ל</p> <p>אתה יכול לשנות את רמות ההתרעה בהתאם למה שאתה והצוות הרפואי שלך מסכימים שהן הרמות הנכונות עבורך. לא ניתן לקבוע רמת התרעה לרמת סוכר נמוכה אשר תהיה גבוהה יותר מרמת היעד הנמוכה שלך, ורמת ההתרעה שלך עבור רמת הסוכר הגבוהה שלך לא יכולה מתחת לרמת היעד הגבוהה שלך.</p>	<p><b>Default setting</b> (הגדרת ברירת מחדל)</p>
<p>נמוכה: 60 - 115 מ"ג/ד"ל גבוהה: 125 - 350 מ"ג/ד"ל</p>	<p><b>Allowable setting</b> (ההגדרה המותרת)</p>
<p>הגדרת התרעת סוכר נמוך תמיד מופעלת. את הגדרת התרעת סוכר גבוה ניתן להפעיל או לכבות. התרעות סוכר גבוה לא תוצגנה או תרטוטנה על גבי המשדר החכם אם מאפיין זה כבוי.</p>	<p><b>On/Off setting</b> (הפעלה/כיבוי של הגדרה)</p>
<p>התרעות צליל והתרעות חזותיות על גבי המכשיר הנייד שלך והתרעות רטט על הגוף של המשדר החכם.</p>	<p><b>הערות</b></p>

### חשוב:


- רמות התרעת לסוכר נמוך וגבוה אותן תקבע הן אותן הרמות המשמשות לספק התרעות חיצוי. עיין בחלק, *הגדרת התרעות חיצוי*.
- עבור iOS 12 או מעל, ו-אנדרואיד 6 ומעלה, אתה יכול לאפשר להתרעות סוכר נמוך ולהתרעות סוכר גבוה שלא נמצאות בטווח של אפליקציית Eversense לעקוף את הגדרות הצליל של הטלפון שלך. ראה *הגדרות צליל למידע נוסף*.

2. תחת **Glucose Alert Levels** (רמת התרעה על סוכר), לחץ על **High Alert** (רמת התרעה על סוכר גבוה) ובחר את רמת ההתרעות המתאימה עבור רמת הסוכר הגבוהה.

- לחץ על **Done** (סיום) לאחר ההשלמה.
- חזור על השלב לבחירת **Low Alert** (התרעה על סוכר נמוך).

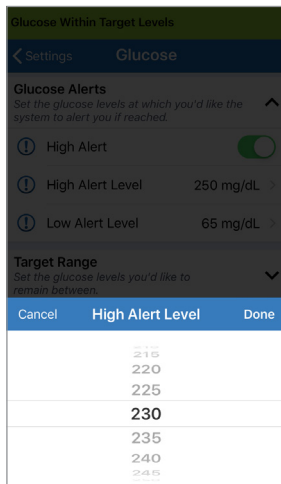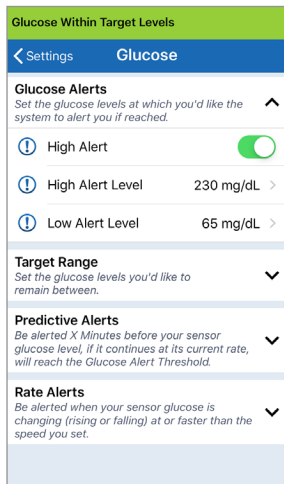

1. לחץ על **Menu > Settings > Glucose** (תפריט < הגדרות < סוכר) על מנת להציג את מסך **GLUCOSE SETTINGS** (הגדרות סוכר).

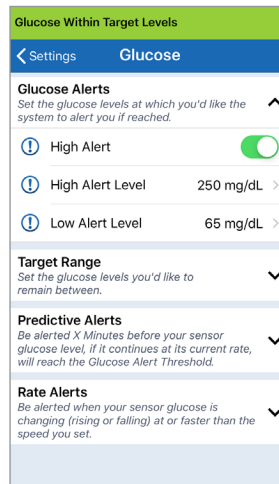



## הגדרה של רמות יעד עבור רמות סוכר

רמות היעד עבור רמות הסוכר הן הרמה הנמוכה והרמה הגבוהה של הטווח אותו הצבת לעצמך במהלך היום. נעשה שימוש בהגדרות אלו באפליקציה על מנת להראות מתי רמות הסוכר שלך נמצאות בתוך טווח היעד שלך.


8

נמוכה: 70 מ"ג/ד"ל גבוהה: 180 מ"ג/ד"ל	<b>Default setting</b> (הגדרת ברירת מחדל)
אתה יכול לשנות יעדים אלו בהתאם למה שאתה והצוות הרפואי שלך מסכימים שהן הרמות הנכונות עבורך.	
נמוכה: 65 - 120 מ"ג/ד"ל גבוהה: 120 - 345 מ"ג/ד"ל	<b>Allowable setting</b> (ההגדרה המותרת)
תמיד פועל (לא ניתן לכבות)	<b>On/Off setting</b> (הפעלה/כיבוי של הגדרה)
בשימוש בגרפים ותרשימים באפליקציה על מנת להראות את הזמן בו היית בטווח היעד.	<b>הערות</b>

2. תחת **Glucose Target Levels** (רמות היעד של הסוכר), לחץ על **High Target** (יעד גבוה) ובחר את רמת יעד הסוכר הגבוה המתאימה.
- לחץ על **Done** (סיום) לאחר ההשלמה.
  - חזור על השלב לבחירת **Low Target** (יעד נמוך).

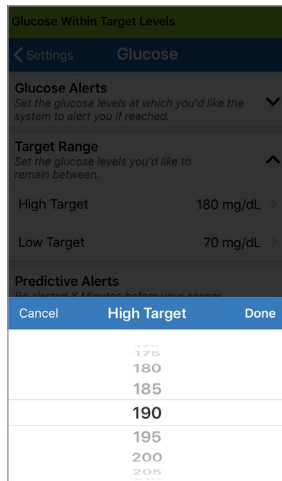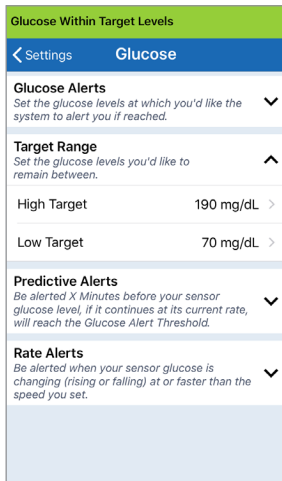

1. לחץ על **Menu > Settings > Glucose** (תפריט > הגדרות > **Glucose** (סוכר) > **GLUCOSE SETTINGS** (הגדרות סוכר)).

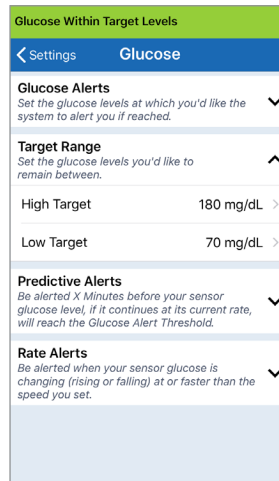

## הגדרת התרעות חיזוי

התרעות החיזוי מודיעות לך מראש שישנו אירוע של רמות סוכר נמוכות או גבוהות אשר עלול להתרחש אם המגמה הנוכחית ממשיכה.

התרעות החיזוי משתמשות ברמות ההתרעה עבור רמות גבוהות או נמוכות של סוכר אשר נקבעות קודם לכן על מנת לספק אזהרה "מוקדמת". אתה קובע את זמן האזהרה המוקדמת (10, 20, או 30 דקות) על מנת שתקבל התרעה מראש על הגעה אל רמות ההתרעה שלך, על בסיס מגמות הסוכר הנוכחיות שלך. כאשר הגעת לזמן האזהרה המוקדמת, המשדר החכם ירטוט והאפליקציה בטלפון הנייד תספק התרעת צליל וכמו כן תציג מסר על גבי המסך.

8




כבוי	<b>Default setting</b> (הגדרת ברירת מחדל)
10, 20, או 30 דקות לפני	<b>Allowable setting</b> (ההגדרה המותרת)
אתה יכול להפעיל או לכבות התרעות אלו. התרעות חיזוי יוצגו רק אם תכונה זו מופעלת. ברירת המחדל היא 20 דקות.	<b>On/Off setting</b> (הפעלה/כיבוי של הגדרה)
התרעות צליל והתרעות חזותיות על גבי המכשיר הנייד שלך והתרעות רטט על הגוף של המשדר החכם.	<b>הערות</b>

2. ליד High and Low Predictive Alerts (התרעות חזיון גבוהות ונמוכות), החלק את לחצן OFF (כבוי) אל ON (פועל).

3. לחץ על Minutes (דקות) על מנת לבחור את כמות הדקות עבור ההתרעה המוקדמת

- לחץ על Done (סיום) לאחר ההשלמה.

1. כדי להפעיל תכונה זו, לחץ על  
**Menu > Settings > Glucose**  
 (תפריט < הגדרות < סוכר) להצגת  
**GLUCOSE SETTINGS** מסך  
 (הגדרות סוכר).

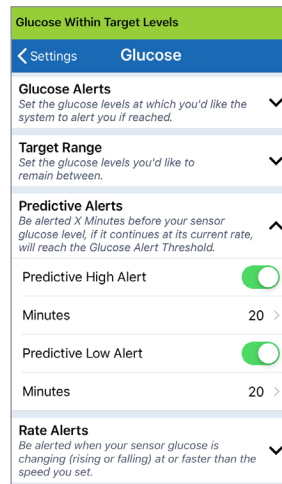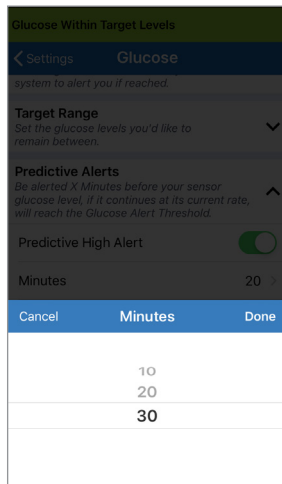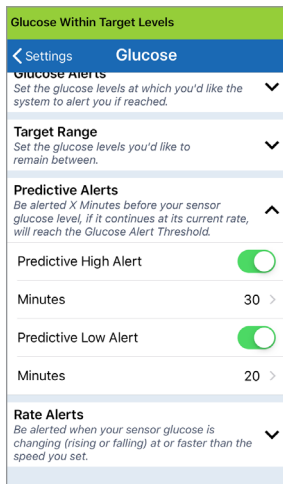

## הגדרה של התרעות עבור קצב שינוי

התרעות ערכי השינוי מודיעות לך כאשר רמות הסוכר שלך נופלות או עולות מהר יותר מהגדרת התרעת הערך אותה תבחר.




כבוי	<b>Default setting</b> (הגדרת ברירת מחדל)
1.5 - 5 מ"ג/ד"ל לדקה	<b>Allowable setting</b> (ההגדרה המותרת)
אתה יכול להפעיל או לכבות התרעות אלו. לא תתרחשנה התרעות קצב שינוי עד אשר מאפיין יופעל.	<b>On/Off setting</b> (הפעלה/כיבוי של הגדרה)
התרעות צליל והתרעות חזותיות על גבי המכשיר הנייד שלך והתרעות רטט של המשדר.	<b>הערות</b>

2. ליד Rate Alerts (התרעות ערך), החלק את לחצן OFF (כבוי) אל ON (פועל).

3. לחץ על Rate of Change (קצב השינוי) על מנת לבחור את הערך.

• לחץ על Done (סיום) לאחר ההשלמה.

1. כדי להפעיל תכונה זו, לחץ על  
Menu > Settings > Glucose  
(תפריט < הגדרות < סוכר) להצגת  
מסך GLUCOSE SETTINGS  
(הגדרות סוכר).

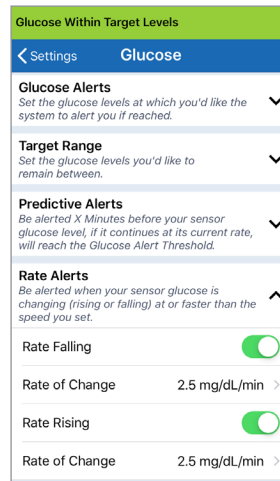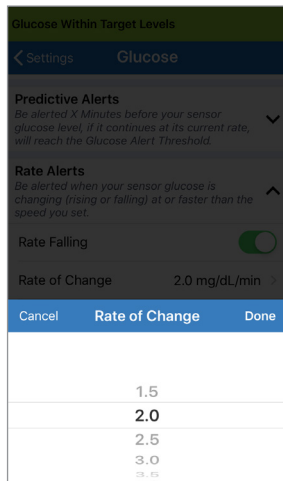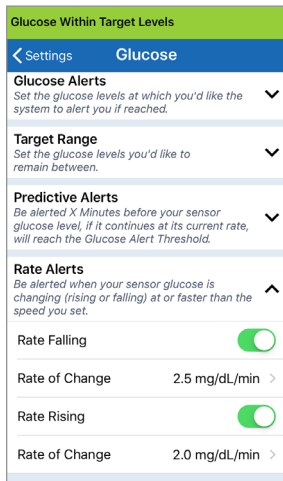


## הגדרה של תזכורות כיול יומיות

באופן אופציונלי אתה יכול להגדיר תזכורות כיול יומיות בזמנים הנוחים עבורך. אתה עדיין תקבל התרעות והודעות כיול המיוצרות על ידי המערכת.

כבוי	<b>Default setting</b> (הגדרת ברירת מחדל)
שעה ביום במרווחים של דקה אחת	<b>Allowable setting</b> (ההגדרה המותרת)
אתה יכול להפעיל או לכבות מאפיין זה. לא תוצגנה התרעות חיזוי אלא אם כן תכונה זו מופעלת.	<b>On/Off setting</b> (הפעלה/כיבוי של הגדרה)
אתה יכול להגדיר תזכורת אחת או שתי תזכורות יומיות. רק הודעות שמע והתרעות חזותיות על גבי מסך הטלפון שלך – ללא רטטים מן המשדר. אם אתה מוחק את האפליקציה לנייד ולאחר מכן מתקין אותה מחדש, יש לאפס תזכורות אלו. תזכורות אלו לא תישמרנה בהיסטוריית ההתרעות. אם אתה מחבר משדר חדש אל אפליקציה קיימת, הגדרות אלו תישארנה ללא שינוי. עיין בחלק 'נא לא להפריע' באפליקציית <i>Eversense</i> ומשירים ניידים למידע נוסף.	הערות

## הגדרת מידע אודות המערכת

מסך SYSTEM (מערכת) מאפשר לך להציג ולערוך הגדרות אחרות במערכת Eversense E3 CGM.

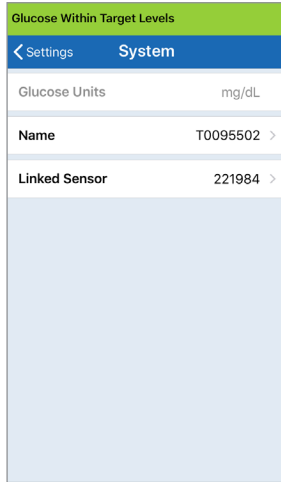

1. לחץ על **System > Settings > Menu** (תפריט < הגדרות < מערכת) להצגת מסך SYSTEMS (מערכת).

2. במסך SYSTEMS (מערכת), אתה יכול ללחוץ על הדברים הבאים על מנת להגדיר אותם:

- **Glucose Units (יחידות סוכר)**. יחידת המידה עבור קריאות הסוכר שלך. יש להתקין מחדש את האפליקציה על מנת לערוך הגדרה זו.
- **שם**. המספר הסידורי של המשדר החכם שלך. אתה יכול גם ללחוץ על המספר הסידורי המוצג כאן ולתת למשדר החכם שלך שם מותאם אישית.
- **Linked Sensor (חיישן מקושר)**. המספר הסידורי של החיישן המקושר כרגע למשדר החכם. לחץ על מאפיין זה על מנת לקבל גישה אל היכולת לקשר או לקשר מחדש חיישן מסוים.

**חשוב:** אין לקשר מחדש את החיישן אלא אם כן מחלקת שירות לקוחות ייעצה לך לעשות זאת. קישור מחדש של החיישן יחזיר את המערכת לשלב האתחול, דבר אשר ידרוש 4 כיולים באמצעות בדיקת סוכר בדם מן האצבע במהלך 36 שעות.

## 4. לחץ על **Cancel** (בטל) או **OK** על מנת להמשיך.

**IMPORTANT**

DO NOT re-link the sensor unless instructed by Customer Care. Re-linking the sensor will return the system to Initialisation Phase and 4 fingerstick calibrations are required within 36 hours. Please keep your transmitter over the sensor during the re-link process. Do you wish to continue?

Cancel
OK

## 5. לחץ על **Cancel** (בטל) או **Re-link** (קשר מחדש).

**Confirm**

Re-linking the sensor will return the system to Initialisation Phase and 4 fingerstick calibrations are required within 36 hours. DO NOT re-link unless instructed by Customer Care.

Cancel
Re-link

## 3. לחץ על **Re-link detected sensor** (קשר מחדש חיישן מאתר).

Glucose Within Target Levels

< System    Linked Sensor

Linked Sensor	221984
Detected Sensor	221984
Re-Link Detected Sensor	>

## 1. אשר עם מחלקת שירות לקוחות שעליך לבצע קישור מחדש של החיישן שלך.



## 2. לחץ על **Linked Sensor** (חיישן מקושר).

Glucose Within Target Levels


< Settings    System

Glucose Units	mg/dL
Name	T0095502 >
Linked Sensor	221984 >

## 6. תהליך הקישור יתחיל. בסיום של כל שלב יוצג סימן ביקורת. התהליך עשוי להימשך עד 10 דקות עד להשלמתו. אל תזיז את המשדר החכם ממיקום החיישן שלך עד אשר סימן האישור השלישי יוצג.

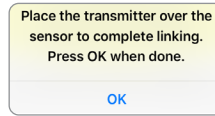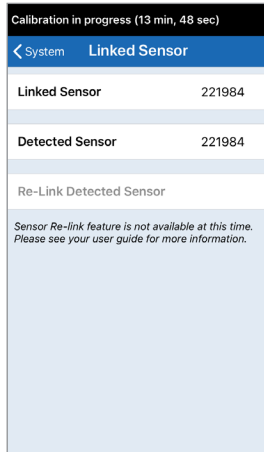

אם המשדר החכם מוזז ממיקום החיישן, המערכת תציג הודעה על כך.

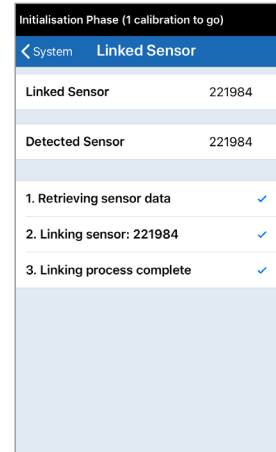

- הערה:** לחצן הקישור מחדש לא יהיה זמין תחת התנאים הבאים:
- יש להטעין מחדש את סוללת המשדר שלך או שהיא ריקה לגמרי.
  - כאשר מתבצע כיוול.
  - לפני שקושר חיישן כלשהו.
  - התרעות מסוימות של החלפת חיישן.
  - אם אחת מן ההתרעות למטה פעילה:
    - סיום חיי המשדר
    - שגיאת זמן מערכת
    - השעיית חיישן

## הגדרת צלילים

מסך **SOUND SETTINGS (הגדרות צליל)** מציג את הגדרות צלילי ההתרעות עבור רמות סוכר גבוהות ונמוכות. מסך זה מאפשר לך להזין הגדרת נמנום עבור ההתרעות המופיעות ברשימה, ונותן לך את האופציה שהתרעות הסוכר הנמוך והתרעות הסוכר הנמוכות מחוץ לטווח תעבורנה מעל להגדרות הצליל של הטלפון שלך (iOS 12 ומעל, ואנדרואיד 6 ומעלה).




**1.** לחץ על **Menu > Settings > Sound Settings < (תפריט הגדרות < הגדרות צליל)** על מנת להציג את מסך **SOUND SETTINGS (הגדרות צליל)**.

**2.** לחץ על כל התרעה על מנת לבחור את הצליל שלה. לחץ על **Back (הקודם)** על מנת לחזור למסך **SOUND SETTINGS (הגדרות צליל)**.

הגדרת התרעת הנוודניק מאפשרת להגדיר באיזו תדירות התרעה תחזור על עצמה לאחר שתקבל התרעה על סוכר נמוך או גבוה.

**3.** לחץ על כל התרעת נוודניק על מנת להגדיר את התדירות בה התרעה חוזרת על עצמה.

• לחץ על **Done (סיום)** לאחר ההשלמה.

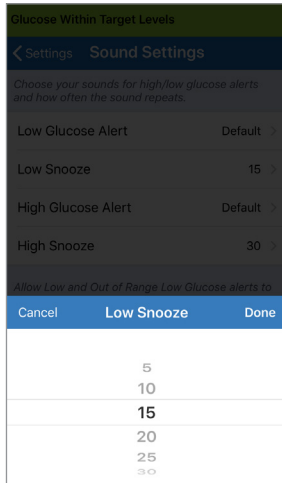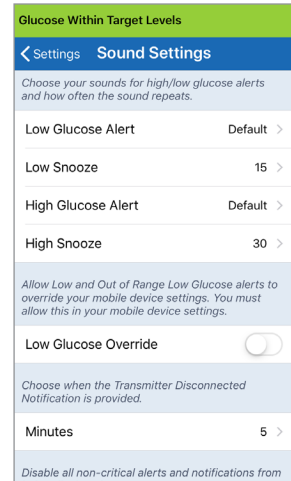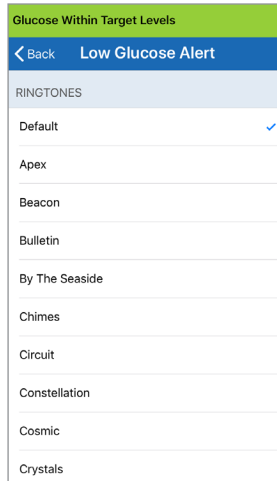


**חשוב:** ודא שהצליל במכשיר הנייד שלך מופעל. אם תכבה את הצליל במכשיר הנייד, לא תשמע צלילים כלשהם מהאפליקציה.

## הגדרת מעקף לסוכר נמוך


אם המכשיר הנייד שלך הוא עם מערכת הפעלה של iOS 12 או מעל, ואנדרואיד 6 ומעלה, אתה יכול באופן אופציונלי לאפשר להתרעות הסוכר הנמוכות ולהתרעות הסוכר הגבוהות של הטלפון שלך. כאשר מאפיין זה מופעל, התרעות הסוכר הנמוכות והתרעות הסוכר הגבוהות של הטלפון שלך. אתה לא יכול לשנות את עוצמת הקול עבור הגדרה זו. דבר זה מאפשר לך לקבל התרעות סוכר נמוכות והתרעות סוכר נמוכות שלא נמצאות בטווח בטלפון שלך, גם כאשר הטלפון שלך נמצא במצב שקט או במצב 'נא לא להפריע'. עליך לאפשר זאת בהגדרות המכשיר הנייד שלך.

### מכשירי iOS


#### 1. לחץ על הלחצן על מנת להפעיל את ההעברה.

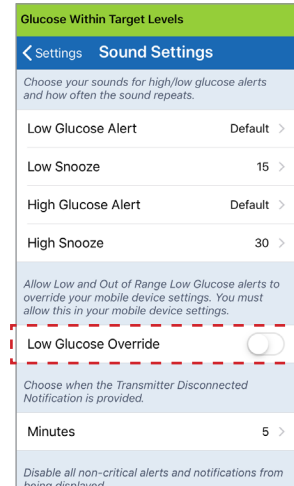

#### 2. לחץ על Settings (הגדרות).

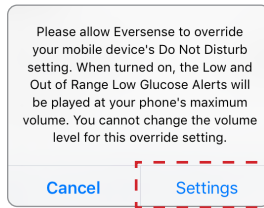


#### 3. לחץ על Allow (אפשר).

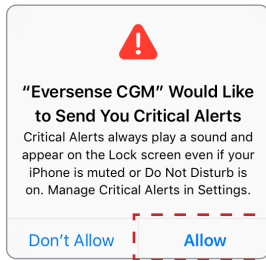

## 4. כעת ניתן להפעיל את ההגדרה מעקף סוכר נמוך

המערכת כעת תאפשר לך לקבל התרעות סוכר נמוכות והתרעות סוכר נמוכות שלא נמצאות בטווח בטלפון שלך בעוצמת צליל מקסימלית, גם כאשר הטלפון שלך נמצא במצב שקט/רטט או במצב 'נא לא להפריע'.

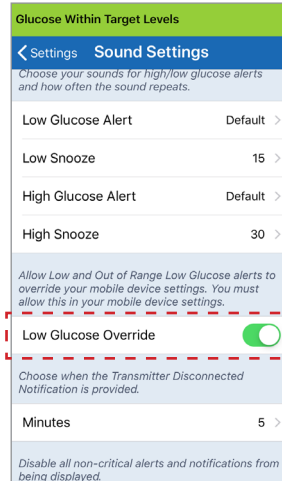




**הערה:** מאפיין זה דומה למאפיין שעון מעורר אשר יישמע תמיד ללא קשר להגדרות הצליל של הטלפון שלך.

Please allow Eversense to override your mobile device's Do Not Disturb setting. When turned on, the Low and Out of Range Low Glucose Alerts will be played at your phone's maximum volume. You cannot change the volume level for this override setting.


Cancel

Settings


הערה: אם תלחץ על **Don't Allow** (אל תאפשר) בשלב 3, לא תוכל לבצע את המעקף של סוכר נמוך. על מנת להפעיל הגדרה זו בכל זמן אחר, כאשר אתה לוחץ על **Settings** (הגדרות) משלב 2, הגדרות ה-Eversense בעמוד הגדרות המכשיר הנייד יוצגו. לחץ על **Allow Critical Alerts** > **Notifications** (הודעות) < **אפשר** (התרעות קריטיות). ולאחר מכן תוכל להפעיל את המעקף של סוכר נמוך באפליקציית Eversense.

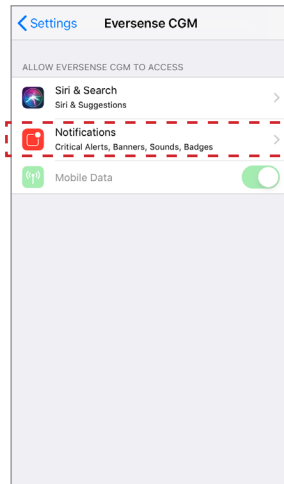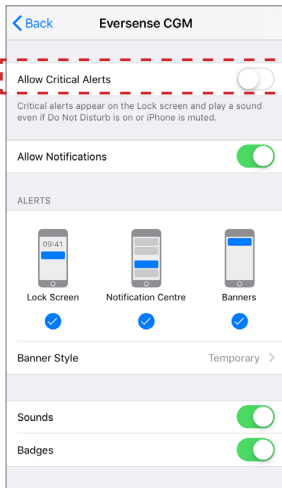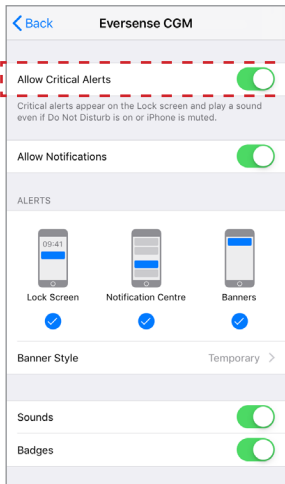


### 1. לחץ על הלחצן על מנת להפעיל את המעקף.

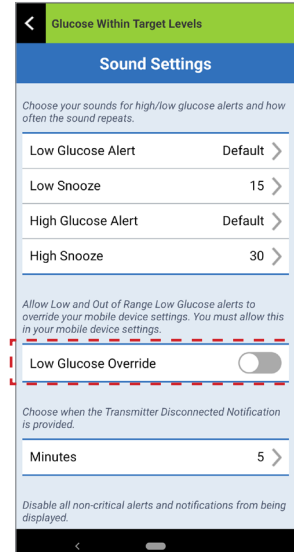


### 2. לחץ על Settings (הגדרות).

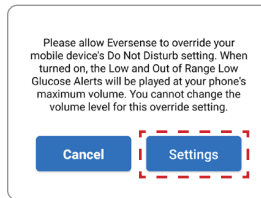


### 3. לחץ על Eversense מעמוד הגישה 'נא לא להפריע'.

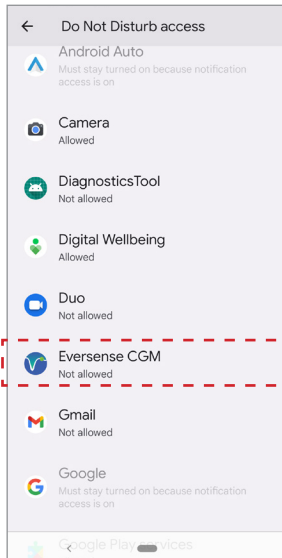

## 5. לחץ על הלחצן ליד ה-Eversense על מנת לאפשר ל-Eversense מעקף הגדרת 'נא לא להפריע'.


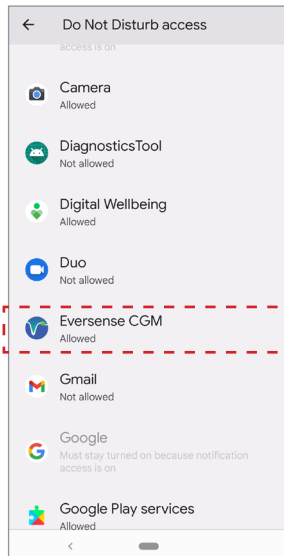


## 4. לחץ על Allow (אפשר).

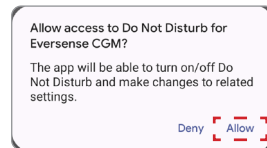


## 6. חזור אל האפליקציה לנייד Eversense CGM

7. לחץ על מעקף של סוכר נמוך על מנת להשמיע את התרעות סוכר נמוכות והתרעות סוכר נמוכות שלא נמצאות בטווח בעוצמת צליל מקסימלית, גם כאשר הטלפון שלך נמצא במצב שקט/רטט או במצב 'נא לא להפריע'.

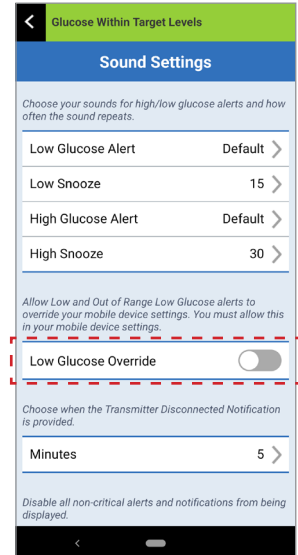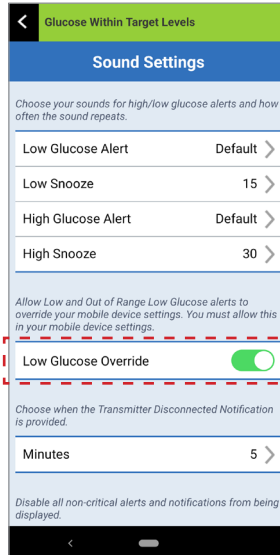


**הערה:** מאפיין זה דומה למאפיין שעון מעורר אשר יישמע תמיד ללא קשר להגדרות הצליל של הטלפון שלך.

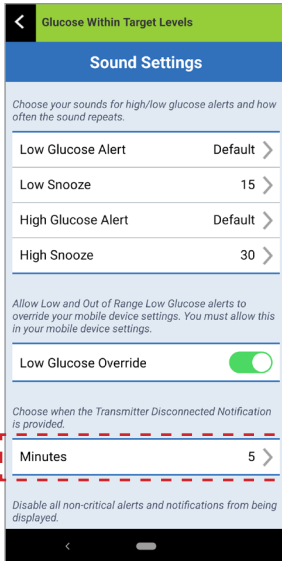

## הגדרת ניתוק משדר

עלולים להיות זמנים בהם חיבור ה-Bluetooth בין המשדר החכם שלך והמכשיר הנייד מנותק. יכול להיות שהדבר קורה בגלל שהמכשיר איננו נמצא בטווח, סוללת המשדר החכם ריקה או כאשר מאפיין ה-Bluetooth כבוי בהגדרות הטלפון שלך. אתה יכול להתאים אישית את הזמן בו המערכת תודיע לך על ניתוק תקשורת. אתה יכול להגדיר התרעת זמן של 5 עד 30 דקות לאחר שהחיבור אבד. כאשר לא קיימת תקשורת בין המשדר החכם והאפליקציה, אתה תקבל רק התרעות רטט מן המשדר החכם. עיין בחלק הבא בנוגע למצב 'נא לא להפריע'.

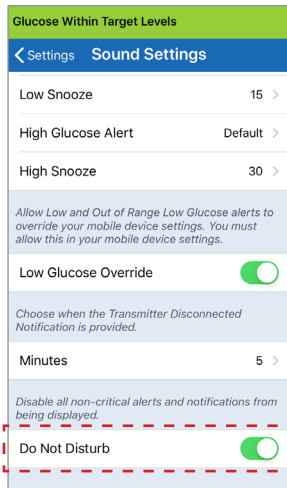

מסך **SOUND SETTINGS** (הגדרות צליל) מאפשר לך להפעיל או לנטרל את מצב 'נא לא להפריע'.

• **Do Not Disturb (נא לא להפריע)**. מעביר את האפליקציה ואת המשדר החכם למצב 'נא לא להפריע'.

• **OFF (כבוי)** – כל ההודעות – התרעות והודעות – ללא קשר למידת הקריטיות שלהן תסופקנה על ידי המשדר החכם והאפליקציה.

• **ON (פועל)** – רק התרעות קריטיות תסופקנה על ידי האפליקציה ועל ידי התרעות הרטט על הגוף של המשדר החכם.

**הערה:** כאשר אתה מפעיל את מצב 'נא לא להפריע' במכשיר הנייד שלך, אתה לא תקבל התרעות או הודעות מאפליקציית Eversense. סמל DND יופיע על גבי מסך הבית. לרשימת התרעות, אנא ראה *תיאורי התרעות*.

## 'נא לא להפריע' באפליקציית Eversense ומכשירים ניידים

DND באפליקציית Eversense DND; פועל; במכשיר הנייד פועל	DND באפליקציית Eversense DND; כבוי; במכשיר הנייד פועל	DND באפליקציית Eversense DND; פועל; במכשיר הנייד כבוי	DND באפליקציית Eversense DND; כבוי; במכשיר הנייד כבוי	
לא	כן	לא	כן	רטט משדר (הודעות והתרעות לא קריטיות)
לא	לא	לא	כן	תצוגת אפליקציית Eversense, צליל טלפון ורטט טלפון (הודעות והתרעות לא קריטיות)
כן	כן	כן	כן	רטט משדר (התרעות קריטיות)
לא	לא	כן	כן	תצוגת אפליקציית Eversense, צליל טלפון ורטט טלפון (התרעות קריטיות)
לא	לא	כן	כן	תזכורות כיוול (הודעת טלפון)
כן	כן	כן	כן	התרעת סוכר נמוך (העברה מעל פועלת)

**חשוב:** חלק ממערכות ההפעלה של הטלפונים מאפשרות לך לעקוף את התרעות סוכר נמוכות בהגדרות הצליל של הטלפון. ראה הגדרות צליל למידע נוסף.



## הגדרת פרופיל זמני

בעת פעולות או תנאים מחוץ לשגרה הרגילה שלך, יכול להיות שתרצה להשתמש באופן זמני בהגדרות רמות סוכר שונות מן ההגדרות הסטנדרטיות אותן הזנת. מסך **TEMP PROFILE** (פרופיל זמני) מאפשר לך לשנות באופן זמני את הגדרות רמות היעד וההתרעה שלך למשך הזמן אותו תבחר. לאחר סיום תקופת הפרופיל הזמני, ההגדרות הסטנדרטיות אותן הזנת עבור רמות הסוכר ב-**Settings > Glucose** (הגדרות < סוכר) תחזרנה באופן אוטומטי להיות פעילות.

1. לחץ על **Menu > Settings > Temp Profile** (תפריט < פרופיל זמני) על מנת להציג את מסך **TEMP PROFILE** (פרופיל זמני).


2. בחר את משך הזמן. אתה יכול להגדיר פרופיל זמני לעד 36 שעות בתוספות של 30 דקות.

8

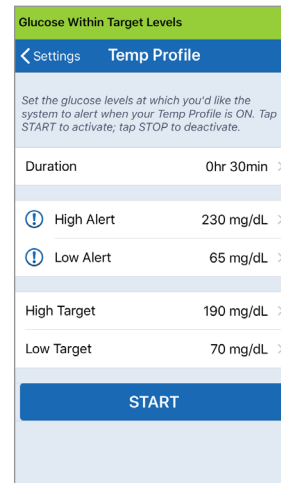
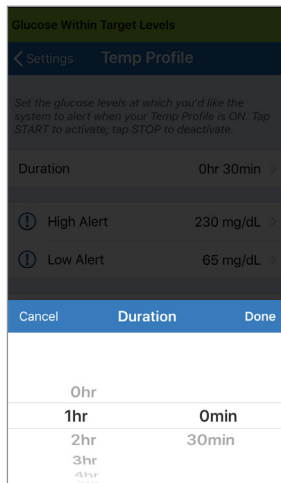


לא ניתן לשנות את בחירות הפרופיל  
 הזמני לאחר שמשך הזמן עבור הפרופיל  
 הזמני החל.


כאשר הפרופיל הזמני פעיל, סמל הפרופיל  
 MY GLUCOSE יוצג על מסך (הסוכר שלי).

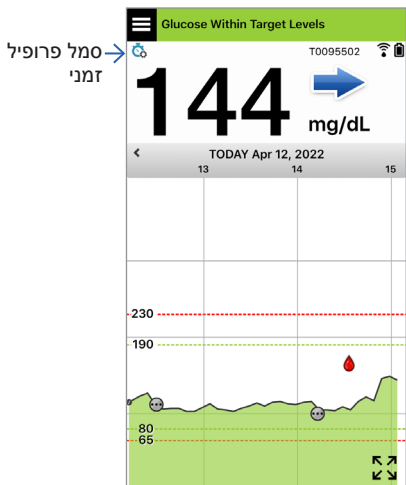


3. קבע את רמות ההתרעה ורמות היעד הגבוהות  
 והנמוכות הרצויות. לחץ על **START** (התחל).

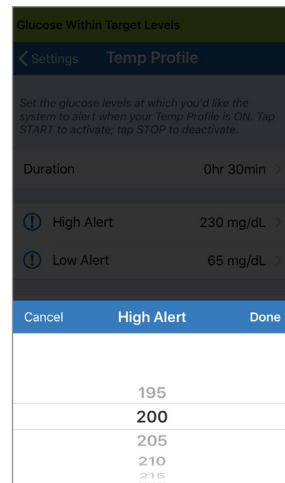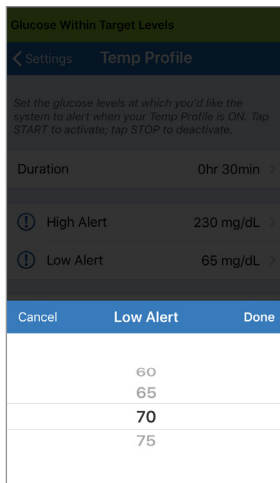

על מנת לסיים את הפרופיל הזמני מוקדם יותר ממה שנקבע, עבור אל **Settings > Temp Profile** (הגדרות < פרופיל זמני) ולחץ על **STOP** (עצור).

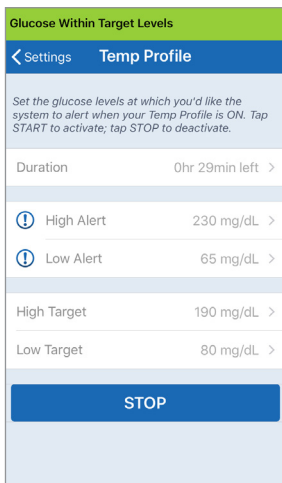

כאשר משך הפרופיל הזמני הסתיים, האפליקציה תציג הודעה על כך וסמל הפרופיל הזמני לא יוצג יותר במסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי).

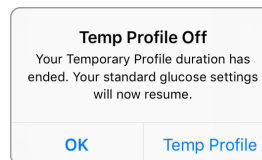

# 9. תיאורי התרעות

חלק זה מתאר את ההתרעות והודעות השונות שתראה על מסכי אפליקציית Eversense ואת הפעולות שעליך לבצע.

מערכת ה-CGM שלך מספקת התרעות והודעות הקשורות לקריאות סוכר ולסטטוס המערכת הן על המשדר החכם שלך והן במכשיר הנייד. המשדר החכם מספק התרעת רטט על הגוף כאשר הקריאות הגיעו לרמות ההתרעה. האפליקציה במכשיר הנייד מספקת התרעת צליל ומציגה מסר במסך **MY GLUCOSE (הסוכר שלי)**. הטבלה למטה מתארת את תבניות הרטט על המשדר החכם ואת המחוננים באפליקציה שלך.

התרעות והודעות	תבנית רטט במשדר החכם	מחונני התרעת האפליקציה
התרעות כאשר אין אפשרות להציג ערכי סוכר דורשות פעולה מידית ומתאימה.	3 רטטים ארוכים	המסר מופיע בצבע צהוב
התרעת סוכר נמוך דורשות פעולה מידית ומתאימה.	3 רטטים קצרים X 3	המסר מופיע בצבע צהוב
התרעות הקשורות לחיזוי נמוך ורמות סוכר נמוכות מחוץ לטווח דורשות פעולה מידית ומתאימה.	3 רטטים קצרים	המסר מופיע בצבע צהוב
התרעות הקשורות לרמות סוכר גבוהות התרעת רמת סוכר גבוהה, חיזוי גבוה ורמות סוכר גבוהות מחוץ לטווח. דורשות פעולה מידית ומתאימה.	רטט ארוך אחד ולאחר מכן 2 רטטים קצרים	המסר מופיע בצבע צהוב


מחווני התרעת האפליקציה	תבנית רטט במשדר החכם	התרעות והודעות
<b>המסר מופיע בצבע צהוב</b>	רטט אחד קצר	<b>התרעות הקשורות לעניינים פחות קריטיים</b> נדרשת פעולה כלשהי, אך בעלת אופי שאינו קריטי. דוגמאות נמצאות בחלק הבא.
<b>המסר מופיע בצבע צהוב</b>	3 רטטים מהירים ולאחר מכן רטט ארוך 2 x	<b>התרעת הטען את המשדר החכם</b> למשדר החכם שלך יש עוצמת סוללה נמוכה ויש להטעין אותו.
<b>המסר מופיע בצבע כחול</b>	רטט אחד קצר	<b>הודעות</b> נדרשת פעולה כלשהי, אך בעלת אופי שאינו קריטי. דוגמאות נמצאות בחלק הבא.

## Alert History (היסטוריית התרעות)

מסך **ALERT HISTORY** (היסטורית התרעות) כולל רשימה של התרעות והודעות אותן קיבלת.

הסמלים הבאים משמשים על מנת להראות את רמת החומרה של המסרים

התרעות 

הודעות 

התרעות הקשורות לסוכר 

התרעות סוללה 


9

**הערה:** כאשר אתה מקבל שתי התרעות או יותר אשר לא נצפו, האפליקציה מציגה אפשרות **Dismiss All (בטל הכל)**. הדבר עלול להתרחש כאשר המכשיר הנייד שלך היה מחוץ לטווח הקליטה של המשדר החכם שלך ולאחר מכן מתבצע סנכרון מחדש. אתה יכול לראות מחדש כל התרעה ב-**Alert History (היסטוריית התרעות)**.

2. אתה יכול לבחור לכלול רק מסרים מסוימים (התרעות והודעות וכו') להצגה על ידי לחיצה על אייקוני ההתרעה הנבחרים.

- לחץ על **ALL (הכול)**, ולאחר מכן לחץ על הסמלים בחלק העליון של המסך על מנת לבחור את סוגי ההתרעות אותם תרצה להציג.


- לחץ על **Menu (תפריט)** לאחר הסיום.

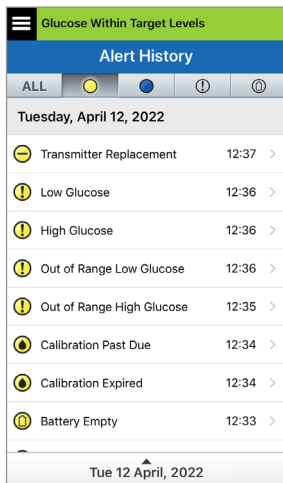

דוגמה להתרעות בלבד

1. לחץ על **Alert History > Menu (תפריט)** < היסטוריית התרעות).

- מסך **ALERT HISTORY (היסטוריית התרעות)** יציג רשימה של כל ההתרעות וההודעות שהתקבלו באותו היום.
- לחץ על כל מסר לקבלת מידע נוסף.

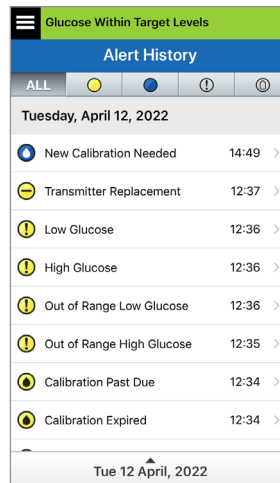



דוגמה לכולם

## תיאורי התרעות ופעולות

הטבלה הבאה מציגה את ההתרעות וההודעות אותן תוכל לקבל באפליקציית Eversense.



**חשוב:** לא ניתן לכבות התרעות המסומנות ב-\* באפליקציה או במשדר החכם על ידי שימוש ב-DND בהגדרות האפליקציה.

### התרעות

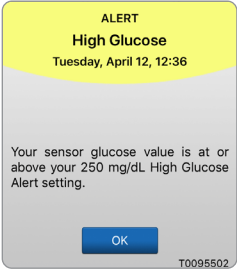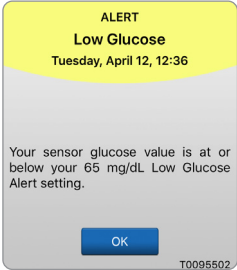תוצאת אפליקציה		
תיאור	<p><b>High Glucose (סוכר גבוה)</b></p> <p>מופיעה בטווח הזמן אותו הזנת בהגדרות הצליל כאשר קריאות הסוכר של החיישן שלך שווה או מעל לרמת ההתרעה עבור רמות סוכר גבוהות אותה הגדרת. מרווח הזמן לחזרה על ההתרעה כברירת מחדל הוא 30 דקות.</p>	<p><b>Low Glucose (סוכר נמוך)*</b></p> <p>מופיעה בטווח הזמן אותו הזנת בהגדרות הצליל כאשר קריאות הסוכר של החיישן שלך שווה או מתחת לרמת ההתרעה עבור רמות סוכר נמוכות אותה הגדרת. מרווח הזמן לחזרה על ההתרעה כברירת מחדל הוא 15 דקות.</p>
פעולות	<p>שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.</p>	<p>שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.</p>

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

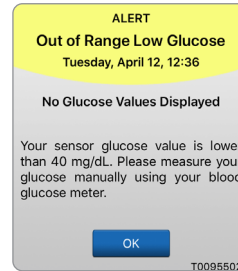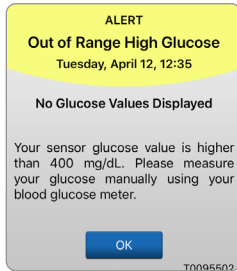

תצוגת אפליקציה

### \*Out of Range High Glucose (סוכר גבוה מחוץ לטווח)

מופיעה כאשר רמת הסוכר שלך גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.

לא ניתן להציג קריאות סוכר (רק **HI (גבוה)** מוצגת במסך **MY GLUCOSE (הסוכר שלי)**).

אשר את רמות הסוכר שלך על ידי בדיקת סוכר בדם לפני כל החלטת טיפול.

כאשר ערך רמת הסוכר המגיע מן החיישן יהיה 400 מ"ג/ד"ל או נמוך יותר, קריאות הסוכר יוצגו שוב.

### Out of Range Low Glucose (סוכר נמוך מחוץ לטווח)\*



מופיעה כאשר רמת הסוכר שלך נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל.

לא ניתן להציג קריאות סוכר (רק **LO (נמוך)** מוצגת במסך **MY GLUCOSE (הסוכר שלי)**).

אשר את רמות הסוכר שלך על ידי בדיקת סוכר בדם לפני כל החלטת טיפול. כאשר ערך רמת הסוכר המגיע מן החיישן יהיה 40 מ"ג/ד"ל או גבוה יותר, קריאות הסוכר יוצגו שוב.

תיאור

פעולות

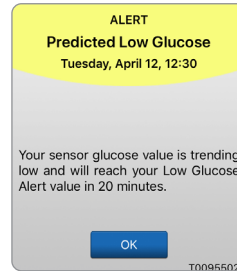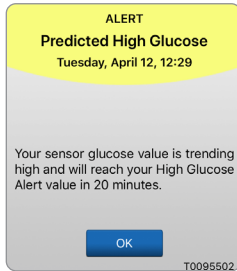

תצוגת אפליקציה

### Predicted High Glucose (סוכר חזוי גבוה)

מופיעה מדי 60 דקות כאשר מגמת ערכי הסוכר נמצאת בעלייה ותגיע לרמת ההתרעה על סוכר גבוה שהגדרת בתוך פרק הזמן שהזנת בהגדרות.

### Predicted Low Glucose (סוכר חזוי נמוך)

מופיעה מדי 60 דקות כאשר מגמת ערכי הסוכר נמצאת בירידה ותגיע לרמת ההתרעה על סוכר נמוך שהגדרת בתוך פרק הזמן שהזנת בהגדרות.

תיאור



פעולות

שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך שונים מערך הסוכר בחיישן או למה שההתרעה מציינת, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך שונים מערך הסוכר בחיישן או למה שההתרעה מציינת, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

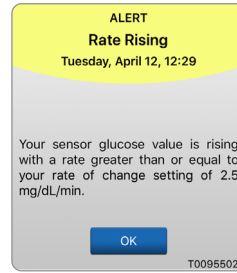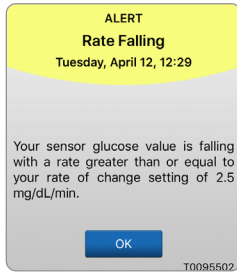

תצוגת אפליקציה

### Rate Falling (קצב ירידה)

מופיעה כל 60 דקות כאשר רמות הסוכר שלך נופלות בשיעור השווה או הגבוה מקצב השינוי אותו הזנת בהגדרות.

### Rate Rising (קצב עלייה)



מופיעה כל 60 דקות כאשר רמות הסוכר שלך עולות בקצב השווה או הגבוה מקצב השינוי אותו הזנת בהגדרות.

תיאור

שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך שונים מערך הסוכר בחיישן או למה שההתרעה מציינת, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך שונים מערך הסוכר בחיישן או למה שההתרעה מציינת, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

פעולות

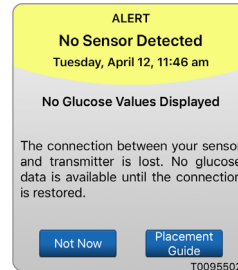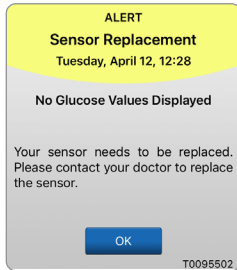

תצוגת אפליקציה

9

### \*Sensor Replacement (החלפת חיישן)\*

מופיעה כאשר הבדיקות העצמיות של המערכת מאתרות שהחיישן איננו מסוגל יותר לספק ערכי סוכר. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד להחלפת החיישן.

### \*No Sensor Detected (לא אותר חיישן)\*

מופיעה כאשר החיבור בין החיישן שלך והמשדר אבד. אין נתוני סוכר זמינים עד אשר מתבצע חיבור מחדש.

תיאור



צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת להחליף את החיישן שלך.

כאשר אתה עושה שימוש במדריך המיקום לעיון, הנח את המשדר החכם מעל לחיישן עד אשר ניתן לראות שקיים חיבור.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

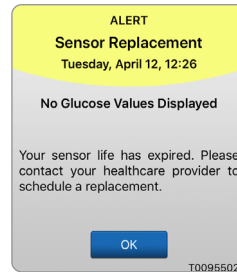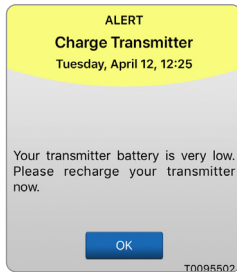

תצוגת אפליקציה

### Charge Smart Transmitter (הטען את המשדר החכם)\*

מופיעה כאשר עוצמת סוללת המשדר החכם נמוכה מאוד ועליך לטעון את הסוללה בהקדם.

### Sensor Replacement (החלפת חיישן)\*

מופיעה כאשר פג תוקפו של חיי החיישן. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד להחלפת החיישן

תיאור



הטען את המשדר החכם שלך בהקדם האפשרי.

צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת להחליף את החיישן שלך.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

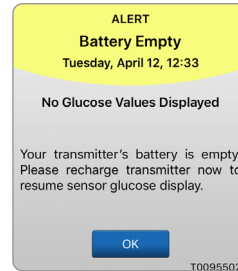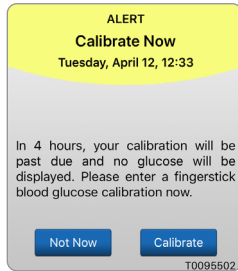

תצוגת אפליקציה

9

### Calibrate Now (כייל עכשיו)

מופיעה על מנת להתריע לך שהגיע הזמן לכיול. אם אתה לא מבצע כיול תוך 4 שעות, לא ניתן יהיה להציג קריאות סוכר.

### Battery Empty (סוללה ריקה)\*



מופיעה פעם אחת כאשר סוללת המשדר החכם ריקה ויש לטעון אותה. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר לא תתבצע טעינה של המשדר החכם.

תיאור

להיץ על **Calibrate** (כייל) בכדי להזין ערך כיול.

הטען את המשדר החכם מיד. הסר את המשדר החכם מן הגוף שלך לפני חיבורו למקור מתח.

פעולות

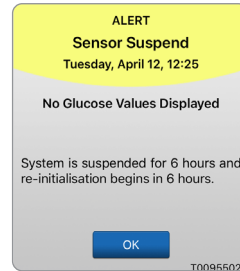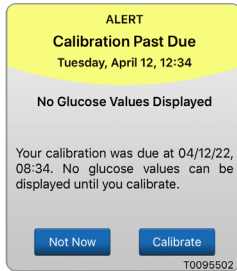

תצוגת אפליקציה

### Calibration Past Due (איחור בכיול)

מופיעה כאשר המערכת שלך צריכה הייתה כבר לבצע כיול (16 שעות בשלב 2 כיולים יומיים ו-28 שעות בשלב 1 כיול יומי).

לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר לא יתבצע כיול.

### Sensor Suspend (השעיית חיישן)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת צורך להתחיל מחדש את שלב האתחול עבור בדיקות כיול נוספות.

לא ניתן להציג קריאות סוכר עד לכיול שני מוצלח.

תיאור



בצע בדיקת כיול בעזרת דם מהאצבע על מנת להציג שוב את קריאות הסוכר שלך.

אתחול מחדש של המערכת יחל בעוד 6 שעות. קריאות רמות הסוכר תוצגנה שוב כמה דקות לאחר ביצוע מוצלח של בדיקת הכיול השנייה של שלב האתחול.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

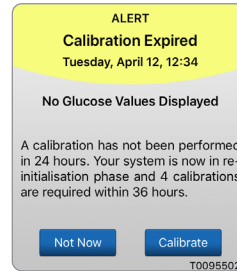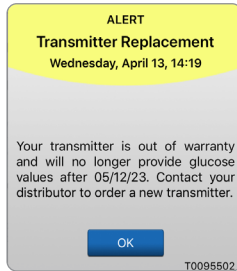

תצוגת אפליקציה

9

### Transmitter End of Life Day 366 (סיום חיי המשדר יום 366)\*

מופיעה פעם ב-7 ימים כאשר המשדר שלך כבר היה בשימוש 365 ימים ואחריות המשדר שלך הסתיימה. לאחר 395 ימי שימוש, המשדר שלך לא יספק יותר קריאות סוכר.

### Calibration Expired (פג תוקף הכיול)

מופיעה כאשר לא בוצע כיול בתוך 24 שעות כאשר המערכת נמצאת בשלב 2 כיולים יומיים או כאשר לא בוצע כיול בתוך 40 שעות כאשר המערכת נמצאת בשלב 1 כיול יומי. המערכת חוזרת לשלב האתחול. לא תוצגנה קריאות סוכר עד אשר לא יתבצע כיול.

תיאור

צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.



בשלב האתחול, עליך לבצע 4 בדיקות כיול בעזרת דם מהאצבע במרווחים של שתיים עד 12 שעות. קריאות רמות הסוכר תוצגנה שוב לאחר ביצוע מוצלח של בדיקת הכיול השנייה בעזרת דם מהאצבע.

פעולות

**הערה:** בכל אחד משלבי הכיול, אם ערך מוזן של כיול מאוד שונה מערך הסוכר של חיישן המערכת, אתה תתבקש לבצע כיול חוזר. אם לא תבצע כיול בתוך 16 שעות, לא תוצגנה קריאות סוכר ולאחר 24 שעות ללא כיול, המערכת תחזור אל שלב האתחול.

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

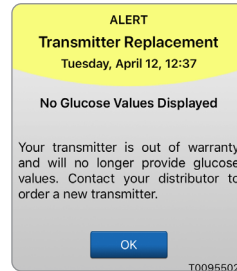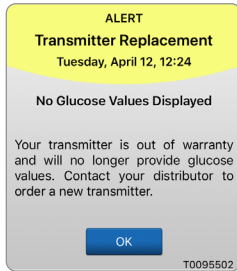

תצוגת אפליקציה

### Transmitter End of Life Day 396 (סיום חיי המשדר יום 396)\*

מופיעה כאשר נעשה שימוש במשדר שלך במשך 395 ימים. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר תחליף את המשדר שלך. אם המשדר שלך הגיע לסוף חייו ולא ניתן לקשר אותו אל חיישן.

צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.

### Transmitter End of Life Day 395 (סיום חיי המשדר יום 395)\*



מופיעה לאחר שאחריות המשדר שלך הסתיימה לפני יותר מ-30 ימים.

לא ניתן להציג קריאות סוכר לאחר תאריך התרעה זו עד אשר תחליף את המשדר שלך.

צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.

תיאור

פעולות

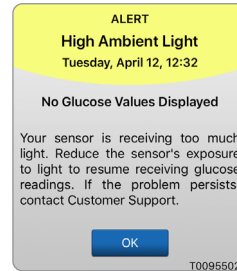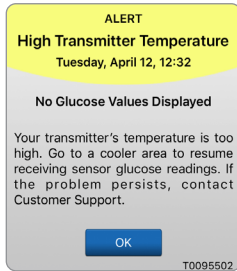

תצוגת אפליקציה

9

### High Smart Transmitter Temperature (טמפרטורה גבוהה של המשדר החכם)\*

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של המשדר החכם גבוהה מדי.

לא מוצגות קריאות סוכר עד אשר טמפרטורת המשדר החכם חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.

### High Ambient Light (תאורת סביבה חזקה)

מופיעה כל 60 דקות כאשר החיישן שלך מקבל יותר מדי תאורת סביבה, דבר המשפיע על היכולת שלו לתקשר עם המשדר החכם.

לא ניתן להציג קריאות סוכר עד להפחתת עוצמת תאורת הסביבה.

תיאור

הפחת את טמפרטורת המשדר החכם על ידי הזזתו למקום קריר יותר. לאחר שהטמפרטורה של המשדר החכם תגיע אל מתחת ל-42°C (108°F), הוא יחזור ויציג ערכי קריאות סוכר.

אתה יכול להסיר באופן זמני את המשדר החכם על מנת לקרר אותו. לאחר שטמפרטורת המשדר החכם ירדה, הנח אותו שוב מעל לחיישן.



הפחת את עוצמת תאורת הסביבה בביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- זוז לאזור אשר פחות חשוף לאור.
- הנח פיסת בד כהה מעל למשדר החכם.
- לבש את המשדר החכם מתחת לבגדים.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

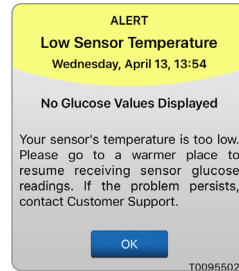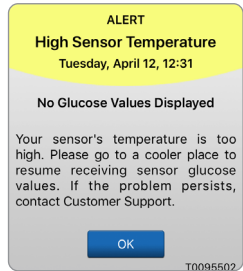

תצוגת אפליקציה

### High Sensor Temperature

(טמפ' חיישן גבוהה)\*

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של החיישן גבוהה מדי.

לא מוצגות קריאות סוכר עד אשר טמפרטורת החיישן חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.

### Low Sensor Temperature

(טמפרטורת חיישן נמוכה)\*

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של החיישן נמוכה מדי.



לא מוצגות קריאות סוכר עד אשר טמפרטורת החיישן חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.

תיאור

עבור לסביבה קרה יותר על מנת להפחית את טמפרטורת החיישן שלך. הסר לזמן קצר את המשדר החכם שלך עד אשר טמפרטורת תימצא בטווח (81 - 104 °F) 26-40°C. לאחר מכן החזר את המשדר החכם למקומו על מנת להתחיל לקבל קריאות רמות סוכר מן החיישן.

עבור לסביבה חמה יותר על מנת להעלות את טמפרטורת החיישן שלך. וודא שהמשדר החכם שלך מופעל על מנת שתוכל להתחיל ולקבל רמות קריאות סוכר כאשר טמפרטורת החיישן נמצאת בטווח (81 - 104 °F) 26-40°C.

פעולות

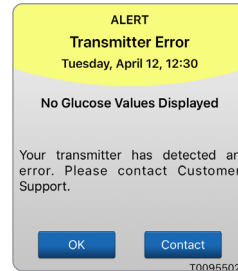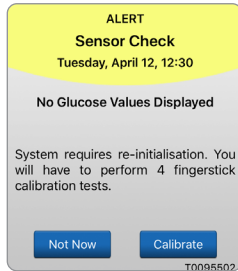

תצוגת אפליקציה

9

### Sensor Check (בדיקת חיישן)

מופיעה פעם אחת כאשר הבדיקות הפנימיות של המערכת מזרות חוסר יציבות של החיישן שמחייבת חזרה לשלב אתחול הכיול. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד לאחר הזנה של כיול שני מוצלח.

### Smart Transmitter Error (שגיאת משדר חכם)\*

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת שגיאת משדר החכם. לא מוצגות קריאות סוכר עד שהשגיאה תתוקן.

תיאור



בשלב האתחול, עליך לבצע 4 בדיקות כיול בעזרת דם מהאצבע במרווחים של שעתיים עד 12 שעות. קריאות רמות הסוכר תוצגנה שוב לאחר ביצוע מוצלח של בדיקת הכיול השנייה בעזרת דם מהאצבע.

עקוב אחר הצעדים המוצגים בחלק איתור וטיפול בבטיות על מנת לאתחל את המשדר החכם שלך. אם איך מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר עם שירות לקוחות.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

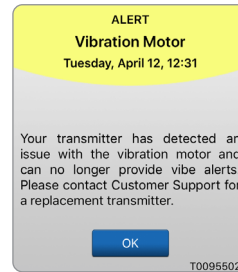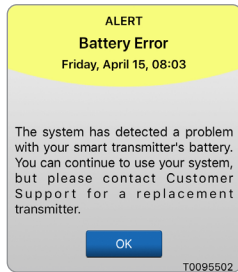

תצוגת אפליקציה

### Battery Error (שגיאת סוללה)\*

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת שגיאת סוללה במשדר החכם שלך. קריאות הסוכר תהיינה מוצגות אבל יהיה צורך להחליף את המשדר החכם שלך.

### Vibration Motor (מנוע רטט)\*



מופיעה כל 60 דקות כאשר מנוע הרטט על גבי המשדר החכם שלך לא יכול לספק יותר התרעות רטט על הגוף. אתה תמשיך לקבל קריאות רמות סוכר עד לכ-72 שעות לאחר קבלת המסר. לאחר 72 שעות, אתה תקבל התרעת שגיאת משדר חכם כל 20 דקות עד אשר תחליף את המשדר החכם.

תיאור

צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.

צור קשר עם שירות הלקוחות על מנת להחליף מיד את המשדר החכם שלך.

פעולות

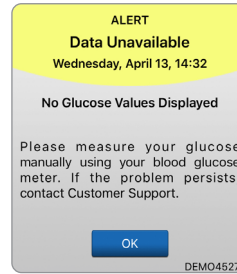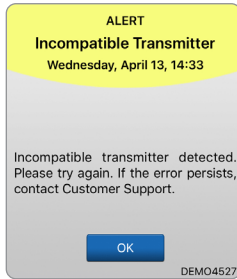

תצוגת אפליקציה

9

### Incompatible Transmitter Detected (אותר משדר לא תואם)\*

מופיעה במהלך הקישור כאשר המערכת מאתרת משדר אשר איננו תואם אל החיישן.

### Data Unavailable (נתונים לא זמינים)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת שגיאת מערכת. לא מוצגות קריאות סוכר עד שהשגיאה תתוקן.

תיאור



נסה קישור מחדש. אם השגיאה מופיעה שוב בניסיון השני, צור קשר עם שירות לקוחות.

חבר את עריסת הטעינה באמצעות כבל אל שקע קיר או יציאת USB. הנח את המשדר החכם בתוך העריסה והסר אותו. אם הבעיה ממשיכה, עקוב אחר הצעדים המוצגים בחלק איתור וטיפול בבעיות על מנת לאתחל את המשדר החכם שלך. אם איך מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר עם שירות לקוחות.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

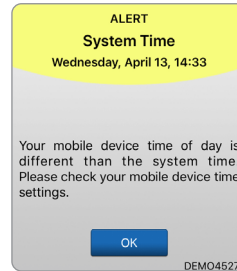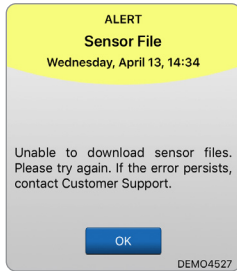

תצוגת אפליקציה

### **Sensor File Error (שגיאת קובץ חיישן)\***

מופיעה כאשר המערכת מאתרת בעיה בעת הקישור.

### **System Time Error (שגיאת זמן מערכת)**

מופיעה כאשר המערכת שלך מאתרת אי התאמה בין שעון המכשיר הנייד שלך ושעון המערכת.

תיאור



נסה קישור מחדש. אם השגיאה מופיעה שוב בניסיון השני, צור קשר עם שירות לקוחות.

הגדר את שעון המכשיר הנייד שלך אל הזמן המקומי. אם הנושא ממשיך, צור קשר עם שירות הלקוחות.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

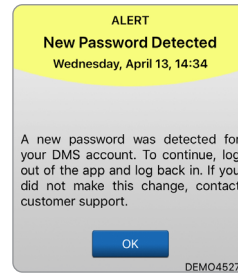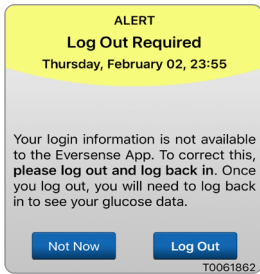

תצוגת אפליקציה

9

### Log Out Required

(נדרשת יציאה מן המערכת)

מופיעה כל 24 שעות עבור משתמשי iOS כאשר המערכת מאתרת שפרטי הכניסה שלך ל-Eversense אינם זמינים דרך מאפיין מחזיק המפתחות של iOS.

### New Password Detected

(זוהתה ססמה חדש)



מופיעה כאשר המערכת מאתרת שינוי של ססמה באמצעות חשבון ה-Eversense DMS שלך.

תיאור

צא מן האפליקציה בטלפון הנייד וכנס אליה חזרה עם שם המשתמש והסיסמה הקיימים שלך.

צא מן האפליקציה בטלפון הנייד וכנס אליה חזרה עם הססמה החדשה.

פעולות

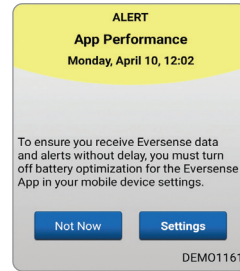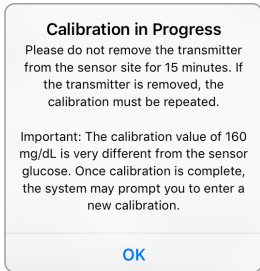

תצוגת אפליקציה

### Calibration In Progress (מתבצע כיוול)

מופיעה כאשר ערך הכיוול שלך שונה באופן משמעותי מערך רמת הסוכר שלך שאותה על ידי החיישן.

### App Performance (ביצועי אפליקציה)\*



מופיע בכל יום עבור מערכות הפעלה של אנדרואיד כאשר המערכת מאתרת נפילות אפליקציה בתדירות גבוהה או הפרעות בתקשורת ה-Bluetooth בגלל שאפליקציית Eversense כלולה בהגדרות אופטימיזציית הסוללה.

תיאור

אין להסיר את המשדר במהלך 15 דקות. בצע כיוול מחדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

עבור אל הגדרות מטוב הסוללה שלך וכבה אותן עבור אפליקציית Eversense על מנת להבטיח שהתרעות ה-Eversense מגיעות ללא איחור.



פעולות

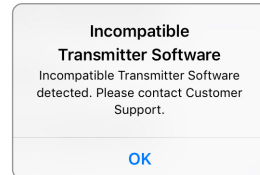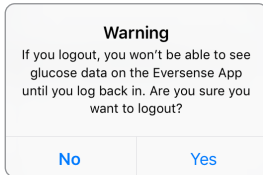

תצוגת אפליקציה

9

<p><b>Log Out Warning</b> (אזהרת יציאה מן המערכת)</p> <p>מופיעה כאשר אתה מנסה לצאת מתוך האפליקציה בטלפון הנייד. אם תצא מן המערכת, לא תוכל לראות נתוני סוכר באפליקצית Eversense.</p>	<p><b>Incompatible Transmitter Software</b> (תוכנת משדר לא תואמת)</p> <p>מופיעה כאשר התוכנה במשדר החכם אינה תואמת לגרסת אפליקציית Eversense CGM במכשיר הנייד שלך.</p>	<p>תיאור</p>
<p>הישאר מחובר לאפליקציה בטלפון הנייד על מנת להמשיך לראות את נתוני הסוכר שלך. אם תתנתק, יהיה עליך להיכנס אליה שוב באמצעות שם המשתמש והססמה שלך בכדי שתוכל להמשיך להשתמש באפליקציה.</p>	<p>צור קשר עם שירות לקוחות.</p>	<p>פעולות</p>

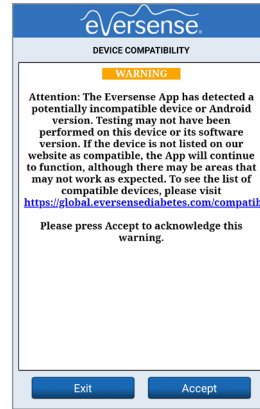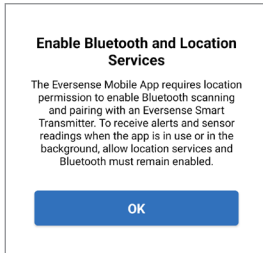

תצוגת אפליקציה

תיאור

פעולות

**Enable Bluetooth and Location Services (אפשר Bluetooth ושירותי מיקום)**  
 עבור אנדרואיד בלבד. מסבירה שהשימוש בשירותי המיקום נחוץ על מנת לאפשר את ה-Bluetooth ולקבל התרעות.



**Incompatible Device/Operating System (מכשיר/מערכת הפעלה לא תואמים)**  
 מופיעה כאשר נעשה שימוש במכשיר/מערכת הפעלה לא מתאימים ביחד עם האפליקציה.

לחץ על **OK** להכרה.

לרשימת מכשירים/מערכות הפעלה מתאימים אנא בקר באתר <https://global.eversensedidiabetes.com>.

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

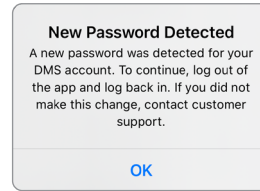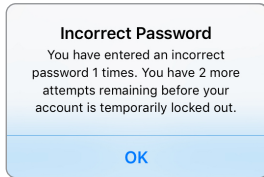

תצוגת אפליקציה

9

### **(סממ שגויה) Incorrect Password**

מופיעה כאשר המערכת מאתרת סממ אחת או יותר שגויות אשר הוזנו באופן עוקב אל תוך האפליקציה שלך.

### **New Password Detected (זוהתה סממ חדש)**

מופיעה כאשר המערכת מאתרת שינוי של סממ באמצעות חשבון ה-Eversense DMS שלך.

תיאור



השתמש בסממ הנכונה והיכנס אל האפליקציה.

צא מן האפליקציה וכנס אליה חזרה עם הסממ החדשה.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## התרעות

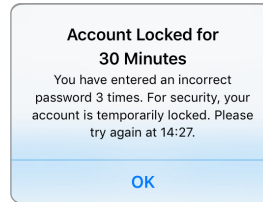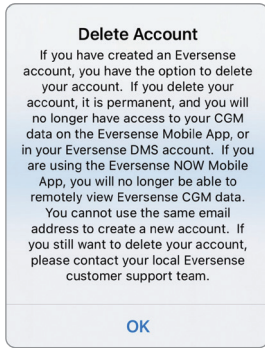

תצוגת אפליקציה

**Delete Account (מחק חשבון)**  
מופיעה כאשר לוחצים על 'מחק חשבון'  
בעמוד הכניסה אל המערכת.

**Account Locked (חשבון ננעל)**  
מופיעה לאחר ששלוש ססמאות שגויות הוזנו  
באופן עוקב אל תוך האפליקציה שלך.

תיאור



צור קשר עם שירות הלקוחות אם אתה  
רוצה להמשיך.

ככה 30 דקות. היכנס אל המערכת באמצעות  
הססמה הנכונה ואפס את הססמה שלך.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## הודעות

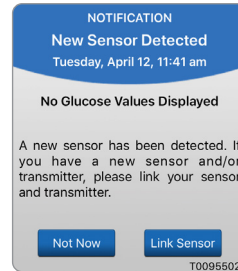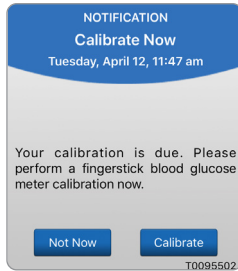

תצוגת אפליקציה

9

### Calibrate Now (כייל עכשיו)

מופיעה כאשר הגיע הזמן לכייל כאשר המערכת נמצאת בשלב האתחול או לאחר שהזון ערך כיוול אשר מאוד שונה מערך הסוכר בחייושן.

### New Sensor Detected (זורה חיישן חדש)

מופיעה כאשר המשדר החכם מאתר חיישן חדש. יש לקשר בין החיישן והמשדר החכם על מנת להתחיל בתקשורת.

תיאור



בצע בדיקת רמת סוכר בעזרת דם מהאצבע והזן את הקריאה כערך הכיול שלך. אל תשתמש בקריאת דגימה ממקום אחר (כגון אמת היד) לקבלת קריאות הסוכר בדם שלך.

לחץ על **Link Sensor (קשר חיישן)** על מנת להשלים את תהליך הקישור ולהתחיל את תקופת החימום הנמשכת 24 שעות. אינך צריך לשאת את המשדר החכם שלך מעל לחיישן עד לסיומה של תקופת החימום.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## Notifications (הודעות)

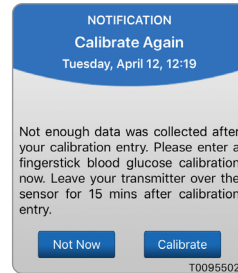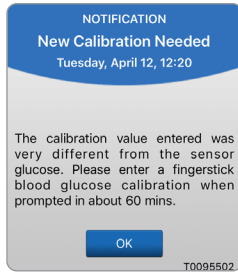

תצוגת אפליקציה

### New Calibration Needed (יש צורך בכיול חדש)

מופיעה כאשר ערך הכיול שהזנת שונה מאוד מערך רמת הסוכר שלך שאותרה על ידי החיישן. לאחר כשעה אחת, אתה תקבל הודעת כייל עכשיו.

### Calibrate Again (כייל שוב)

מופיעה כאשר לא נאספו מספיק נתונים במהלך הכיול.

תיאור


הזן ערך כיול חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

לחץ על **Calibrate** (כייל) בכדי להזין ערך כיול חדש.

פעולות

## תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

### Notifications (הודעות)

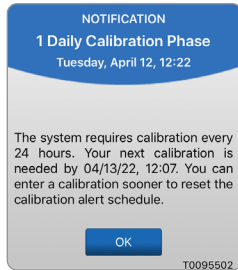

תצוגת אפליקציה

9

**1 Daily Calibration (כיוול 1 יומי)**  
מופיעה כאשר המערכת מצריכה כיוול פעם אחת ב-24 שעות.

**Sensor Replacement (החלפת חיישן)**  
מופיעה 30, 60, 14, 7, 3 יום אחד לפני סיומ תקופת הנשיאה של החיישן שלך כתזכורת שאתה צריך להחליף את החיישן שלך.

תיאור



הזן ערך כיוול חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת לקבוע תור להסרת החיישן והחלפתו.

פעולות

# תיאורי התרעות ופעולות (המשך)

## Notifications (הודעות)

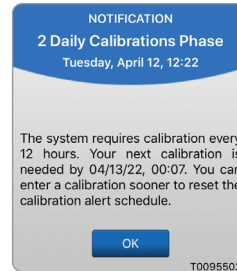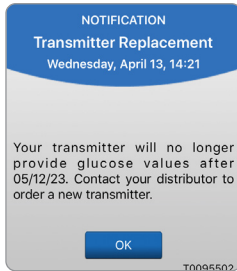

תצוגת אפליקציה

**Transmitter End of Life Day 330**  
**(סיום חיי המשדר יום 330)**  
 מופיעה פעם אחת 35 ימים לפני סיום  
 אחריות המשדר.

**2 Daily Calibrations (2 כילים ביום)**  
 מופיעה כאשר המערכת מצריכה כיל  
 פעמיים ביום.

תיאור

צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין  
 משדר חדש.

הזן ערך כיל חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

פעולות

# 10. יומן אירועים


חלק זה מתאר איך לראות מחדש ולתעד אירועים על מנת לעקוב ביתר קלות אחר מגמות סוכר.


מערכת Eversense E3 CGM מאפשרת לך לתעד ולעקוב אחר אירועים בנוסף לניטור רציף של רמות הסוכר שלך. אתה יכול להזין באופן ידני אירועים אשר יופיעו על גבי גרף המגמה ודוחות סוכר על מנת לעזור לך למצוא מגמות בפרופיל הסוכר שלך.


## סוגי אירועים:

סוכר 

ארזחות 

אינסולין 

בריאות 

פעילות גופנית 

10

**הערה:** אתה יכול גם להיכנס אל מסך **ADD EVENT** (הוספת אירוע) הישר ממסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי) על ידי לחיצה בודדת בכל מקום בשטח הגרף.

אתה יכול לראות אירועים שהוזנו בעבר במסך **EVENT LOG** (יומן האירועים).

1. לחץ על **Event Log** > **Menu** (תפריט < יומן אירועים).  
מסך **EVENT LOG** (יומן אירועים) יופיע.

2. כל האירועים אותם הזנת יופיעו.

אתה יכול גם לבחור גם לראות סוגי אירועים ספציפיים על ידי לחיצה על סוג אירוע מסוים.

- לחץ על **ALL** (הכול), ולאחר מכן לחץ על האייקונים בחלק העליון של המסך על מנת לבחור רק את סוגי האירועים שתצצה לראות.



Glucose Within Target Levels		
Event Log +		
ALL	👇	👆
Friday, April 15, 2022		
🏃	Exercise, 1hr 0min	21:35 >
🤒	Health, Fever	21:35 >
💉	Insulin, 2.0 units	21:34 >
🍳	Breakfast, 15 grams	21:34 >
🩸	Glucose, 99 mg/dL	20:12 >
🔥	Calibration, 101 mg/dL	19:53 >
🔥	Calibration, 105 mg/dL	09:09 >
Thursday, April 14, 2022		
🩸	Glucose, 100 mg/dL	13:22 >
Fri 15 April, 2022		

# תעד אירועים ספציפיים

סוכר



הזן ועקוב אחר בדיקות הסוכר בדם (תוצאות בדיקות אחרות מתוצאות בדיקות הכיול).

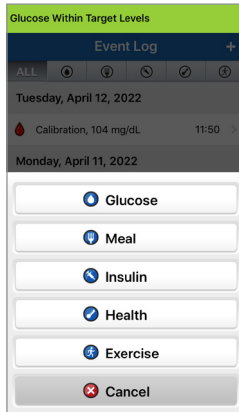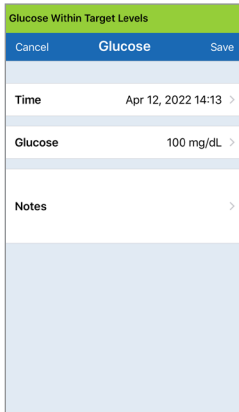

1. לחץ על **Event Log > Menu (תפריט < יומן אירועים)**.


2. הוסף אירוע על ידי שימוש באייקון האירוע **Glucose (+)** (סוכר).

3. לחץ על **Time (זמן)** על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים. לחץ על **Done (בוצע)**.


4. לחץ על **Glucose (סוכר)** על מנת להזין את הערך המתאים עבור הסוכר הדמי. לחץ על **Done (בוצע)**.

**הערה:** תוכל להזין ערך סוכר בין 20 ל- 600 מ"ג/ד"ל. ערכים מתחת ל-20 מ"ג/ד"ל יומרו ל-20, וערכים מעל 600 מ"ג/ד"ל יומרו ל-600 למטרות חישוב ותצוגה.

5. לחץ על **Save (שמירה)**.

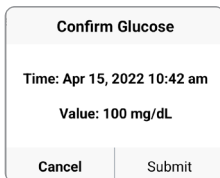

אנדרואיד

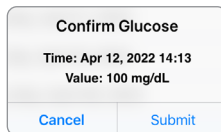

iOS

6. בתוך תיבת 'אישור הסוכר' הקופצת, לחץ על **Submit (שלח)** על מנת לאשר את אירוע הסוכר וחזור אל מסך **EVENT LOG (יומן אירועים)**, או לחץ על **Cancel (ביטול)** על מנת לצאת מבלי לשמור את השינויים או לערוך את המידע לפני שמירה.

**הערה:** אירועי סוכר לא מחליפים מדידות כיול. אתה עדיין צריך להזין את קריאות הכיול.



הזן סוג של ארוחה, תאריך ושעה וספירת פחמימות.

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Meal	Save
Time	Apr 12, 2022 14:14	>
Type	Breakfast	>
Carbs	15 grams	>
Notes		>

1. לחץ על **Event Log > Menu** (תפריט < יומן אירועים).

2. הוסף אירוע על ידי שימוש באייקון האירוע “+” < **Meals** (ארוחות).

3. לחץ על **Time** (זמן) על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים.  
לחץ על **Done** (בוצע).

4. לחץ על **Type** (סוג) על מנת להזין את סוג הארוחה.  
לחץ על **Done** (בוצע).

5. לחץ על **Carbs** (פחמימות) להכנסת מספר פחמימות מתאים.  
לחץ על **Done** (בוצע).

6. לחץ על **Notes** (הערות) על מנת להזין הערות.  
לחץ על **Done** (בוצע).

7. לחץ על **Save** (שמור) על מנת לשמור ולחזור למסך **EVENT LOG** (יומן אירועים). לחץ על **Cancel** (ביטול) על מנת לצאת מבלי לשמור את השינויים.



הזן את יחידות האינסולין בהתאם לזמן ולסוג האינסולין.

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Insulin	Save
Time	Apr 12, 2022 14:15 >	
Units	2.0 >	
Type	Rapid-acting >	
Notes	>	

1. לחץ על **Event Log > Menu > (תפריט < יומן אירועים)**.

2. הוסף אירוע על ידי שימוש בסמל האירוע **+** **Insulin (אינסולין)**.

3. לחץ על **Time (זמן)** על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים.  
לחץ על **Done (בוצע)**.

4. לחץ על **Units (יחידות)** על מנת להזין את מספר היחידות המתאים.  
לחץ על **Done (בוצע)**.

**הערה:** המספר המקסימלי של יחידות אינסולין שניתן להזין הוא 200U.

5. לחץ על **Type (סוג)** על מנת להזין את סוג האינסולין המתאים.  
לחץ על **Done (בוצע)**.

6. לחץ על **Notes (הערות)** על מנת להזין הערות.  
לחץ על **Done (בוצע)**.

7. לחץ על **Save (שמור)** על מנת לשמור ולחזור למסך **EVENT LOG (יומן אירועים)**. לחץ על **Cancel (ביטול)** על מנת לצאת מבלי לשמור את השינויים.



הזן את סוג המצב הבריאותי, חומרה ואת התאריך והשעה.

Glucose Within Target Levels	
Cancel	Health
Save	
Time	Apr 12, 2022 14:16 >
Severity	Medium >
Condition	Fever >
Notes	>

1. לחץ על **Event Log > Menu** (תפריט < יומן אירועים).

2. הוסף אירוע על ידי שימוש בסמל האירוע “+” < **Health** (בריאות).

3. לחץ על **Time** (זמן) על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים.  
לחץ על **Done** (בוצע).

4. לחץ על **Severity** (דרגת חומרה) על מנת להזין נמוכה, בינונית או גבוהה.  
לחץ על **Done** (בוצע).

5. לחץ על **Condition** (מצב) על מנת להזין את המצב הבריאותי.  
לחץ על **Done** (בוצע).

6. לחץ על **Notes** (הערות) על מנת להזין הערות.  
לחץ על **Done** (בוצע).

7. לחץ על **Save** (שמור) על מנת לשמור ולחזור למסך **EVENT LOG** (יומן אירועים). לחץ על **Cancel** (ביטול) על מנת לצאת מבלי לשמור את השינויים.



Glucose Within Target Levels		
Cancel	Exercise	Save
Time	Apr 12, 2022 14:16 >	
Intensity	Medium >	
Duration	1hr 0min >	
Notes	>	

1. לחץ על **Event Log** > **Menu** (תפריט < יומן אירועים).

2. הוסף אירוע על ידי שימוש בסמל האירוע “+” < **Exercise** (פעילות גופנית).

3. לחץ על **Time** (זמן) על מנת להזין את התאריך והשעה המתאימים. לחץ על **Done** (בוצע).

4. לחץ על **Intensity** (עצימות) כדי להזין **Low** (נמוכה), **Medium** (בינונית) או **High** (גבוהה). לחץ על **Done** (בוצע).

5. לחץ על **Duration** (משך הזמן) על מנת להזין את המשך. לחץ על **Done** (בוצע).

6. לחץ על **Notes** (הערות) על מנת להזין הערות. לחץ על **Done** (בוצע).

7. לחץ על **Save** (שמור) על מנת לשמור ולחזור למסך **EVENT LOG** (יומן אירועים). לחץ על **Cancel** (ביטול) על מנת לצאת מבלי לשמור את השינויים.

# 11. דוחות

חלק זה מתאר את דוחות הסוכר השונים הזמינים ליצירת סיכום פרופיל הסוכר שלך. אתה יכול לבחור בתאריכים מסוימים או במרווחי זמן אשר נקבעו מראש.

## סוגי דוחות

- סיכום מודלי שבועי.
- תרשים עוגה עבור הסוכר.
- סטטיסטיקות סוכר.

**הערה:** וודא שהתאריך והשעה על גבי המכשיר הנייד שלך נכונים. דיוק הגרפים והדוחות תלוי בנכונות התאריך והשעה.


על מנת לראות דוחות רמות סוכר, לחץ על **Menu > Reports (תפריט < דוחות)** והחלק על מנת לעבור בין שלושה דוחות שונים. אתה יכול גם לשלוח כל דוח בדוא"ל על ידי לחיצה על סמל הדוא"ל בפינה הימנית העליונה.

## סיכום מודלי שבועי

דוח זה מראה את קריאות הסוכר שלך בשבעת הימים האחרונים, כאשר הם מסוכמים בתבנית גרף קו של 24 שעות על מנת לראות את המגמות לאורך כל יום.

- ה-**קו הכחול** מסמן את ממוצע קריאות הסוכר שלך בשבוע האחרון בבלוק של שעה אחת.
- ה-**סרגלים האדומים** מראים את הקריאה הנמוכה ביותר והקריאה הגבוהה ביותר למעשה באותו בלוק של שעה אחת.
- ה-**הקווים האדומים המקווקווים** מסמנים את רמות ההתרעות שהגדרת עבור קריאת הסוכר הנמוכה והגבוהה.
- ה-**הקווים הירוקים המקווקווים** מסמנים את רמות היעד שהגדרת עבור קריאת הסוכר הנמוכה והגבוהה.

דוח זה מספק גם סיכום סטטיסטי (ממוצע הקריאות, סטיית תקן של הקריאות), ביצועי יעדי הסוכר (אחוז בתוך, מעל ומתחת לרמות היעד של הסוכר) והערכים הגבוהים והנמוכים של קריאות הסוכר (אחוז הקריאות שנכלל בטווח רמות היעד הנמוך והגבוה של הסוכר). המידע מוצג בהתבסס על משבצות זמן של 6 שעות.

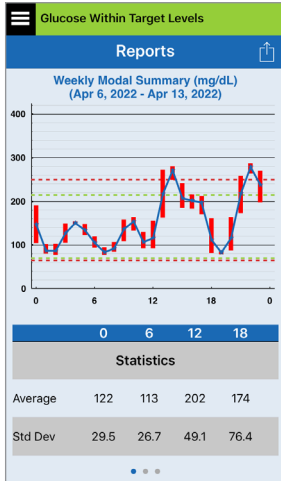


## טטיסטיקות סוכר

דוח זה מראה את קריאות הסוכר הנמוכות, הגבוהות והממוצעות, ביחד עם סטיית התקן בתוך משבצות זמן של 6 שעות. אתה יכול לבחור ביום האחרון, ב-7, 14, 30 או 90 הימים האחרונים.


Glucose Within Target Levels				
Reports				
1 Day	7 Days	14 Days	30 Days	90 Days
Glucose Statistics (mg/dL) (Apr 12, 2022 - Apr 13, 2022)				
Period	Avg.	Low	High	Std Dev
0 - 6	122	78	190	29.5
6 - 12	113	78	163	26.7
12 - 18	202	93	280	49.4
18 - 0	174	80	286	76.4
ALL	153	78	286	61.7

## תרשים עוגה עבור הסוכר.

דוח זה מראה בפורמט גרפי איזה אחוז מן הקריאות שלך בתוך תקופת זמן קבועה, נמצאו מעל או מתחת לרמות היעד עבור קריאות הסוכר שלך. אתה יכול לבחור ביום האחרון, ב-7, 14, 30 או 90 הימים האחרונים.

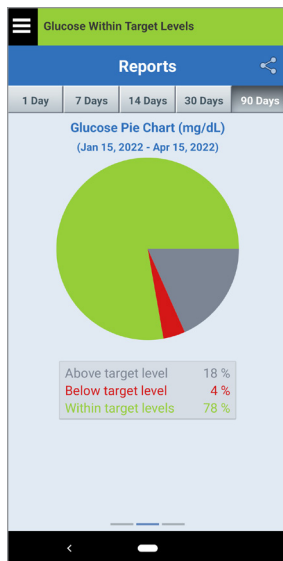

אנדראיד

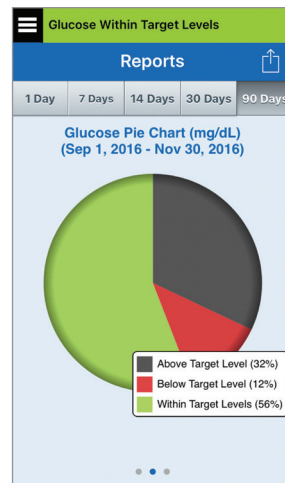

iOS

# 12. שיתוף נתונים

אתה יכול לשתף נתונים בדרכים רבות עם Eversense.

## תכנית Eversense של Data Management Software (DMS)

תכנית Eversense DMS היא אפליקציה מבוססת אינטרנט המאפשרת למטופלים, למטפלים ולצוות הרפואי המקצועי להציג ולנתח את נתוני הסוכר ששודרו מהמסדר החכם של Eversense E3 או מאפליקציית מערכת Eversense CGM למכשירים ניידים.

תכנית זו מוצעת ללא תשלום עבור משתמשי מערכת Eversense E3 CGM. למידע נוסף על תכנית DMS של Eversense, עבור לכתובת <https://global.eversensedidiabetes.com>. כאשר אתה יוצר ורושם את החשבון שלך בעת ההתקנה של אפליקציית Eversense CGM, חשבון Eversense DMS נוצר עבורך באופן אוטומטי. בחלק Eversense NOW ניתן למצוא מידע נוסף בנוגע לדרך בה ניתן לראות נתוני סוכר ממערכת Eversense E3 CGM מרחוק.

**חשוב:** המערכת לניהול הנתונים של EVERSENSE E3 איננה מספקת עצות רפואיות. שינויים בתכנית הטיפול שלך יתבצעו רק על ידי הצוות הרפואי שלך.

## שתף את הנתונים שלי

מאפיין Share My Data (שתף את הנתונים שלי) באפליקציה לנייד של מערכת Eversense CGM מאפשר לך לסנכרן באופן ידני את הנתונים שלך אל חשבון ה-Eversense DMS שלך, להזמין חברים ובני משפחה לצפות מרחוק בנתוני ה-CGM שלך באמצעות האפליקציה לנייד Eversense NOW ולהתחבר עם אפליקציות בריאות תואמות אחרות.






## סנכרון

בכל זמן בו יש לך חיבור לאינטרנט, פונקציית הסנכרון האוטומטי מופעלת ואתה נמצא באפליקציה, קריאות הסוכר שלך מסונכרות לחשבון ה-Eversense DMS שלך בערך כל 5 דקות. אתה יכול לנטרל את פונקציית הסנכרון האוטומטי.

על מנת לנטרל את פונקציית הסנכרון האוטומטי, לחץ על **Sync** (סנכרון) במסך **SHARE MY DATA** (שיתוף הנתונים שלי). העבר את לחצן **Auto Sync** (סנכרון אוטומטי) למצב כבוי.

על מנת לסנכרן את הנתונים שלך באופן ידני, לחץ על לחצן **START SYNC** (התחל סנכרון). נתונים עבור מספר הימים המוגדר כברירת מחדל יסונכרו. אתה יכול לקבוע כברירת מחדל עבור מספר ימי סנכרון יום אחד, 3, 7, 14 או 30 ימים.

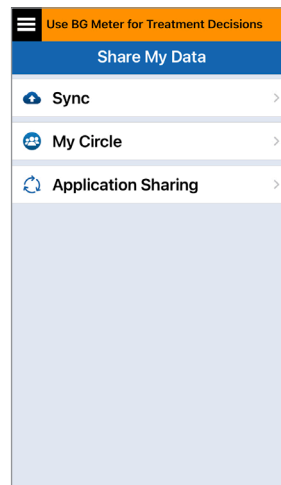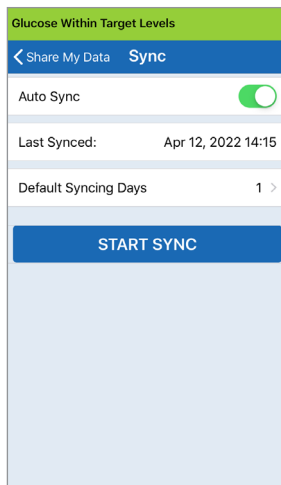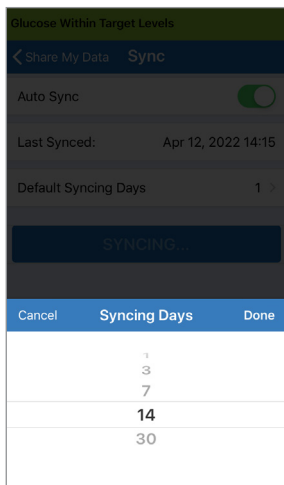


**חשוב:** אם אתה מנטרל את פונקציית הסנכרון האוטומטי, הנתונים שלך לא יישלחו לאף אחד על ידי שימוש באפליקציית Eversense NOW על מנת לנטרל מרחוק את נתוני הסוכר שלך, והיסטוריית נתוני הסוכר שלך לא תאוחסן בחשבון ה-DMS שלך.

## המעגל שלי






המעגל שלי היא תכונה אופציונלית שמאפשרת להפעיל את הניטור מרחוק של נתוני Eversense E3 CGM. למידע נוסף בנוגע למאפיין זה, ראה המעגל שלי - ניטור מרחוק.

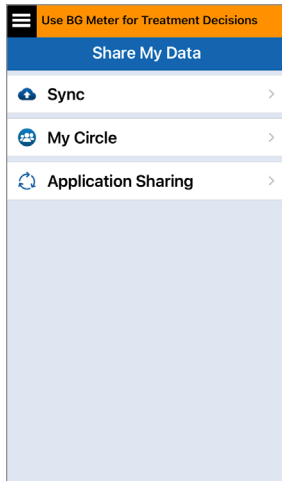

## שיתוף אפליקציה



Application Sharing (שיתוף אפליקציה) הוא מאפיין אופציונלי המאפשר לך לשתף נתוני Eversense מסוימים עם אפליקציות בריאות תואמות אחרות. גע באפליקציה והפעל את **Share Data** (שתף נתונים). יכול להיות שגם יהיה צורך לאפשר שיתוף נתונים באפליקציית הבריאות.

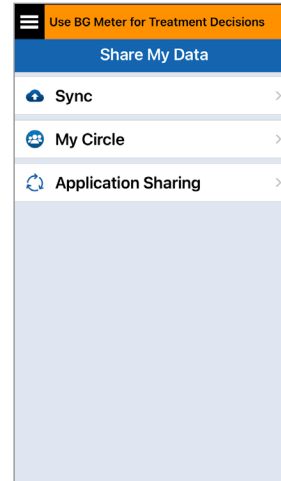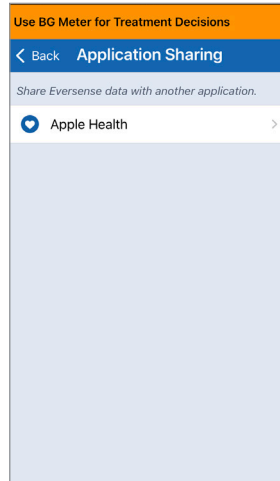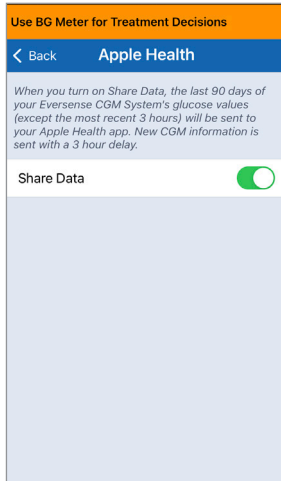

# 13. מידע מוצר ומידע כללי בתוך האפליקציה

חלק זה מתאר את המידע הזמין בחלק ה-'אודות' של התפריט הראשי.

אתה יכול לראות מידע אודות המשדר החכם שלך, החיישן ואפליקציית Eversense CGM במכשיר הנייד שלך.

במסך **My Sensor** (החיישן שלי), אתה יכול למצוא את המספר הסידורי של החיישן ונתונים אודות ההחדרה.

Glucose Within Target Levels	
About My Sensor	
Linked SN	221984
Insertion Date	04/08/22
Insertion Time	15:59
Detected SN	221984

במסך **My Transmitter** (המשדר שלי), אתה יכול למצוא מידע הכולל את המספר הסידורי, מידע אודות כיול ועוצמת הסוללה. אתה יכול גם להדגים את מאפיין הרטט של המשדר החכם.

Glucose Within Target Levels	
About My Transmitter	
Device Information	▼
Calibration Information	▼
Demonstration	▼

1. לחץ על **Menu > About** (תפריט < אודות) ולאחר מכן הקש על **My Transmitter** (המשדר שלי), **My Sensor** (החיישן שלי) או **Product Information** (מידע על המוצר).


Glucose Within Target Levels	
About	
My Transmitter	>
My Sensor	>
My Account	>
Product Information	>
Contact Us	>
Licence Agreement	>
Privacy Statement	>
Help	>

## תמונת פרופיל


ניתן לעדכן את תמונת הפרופיל שלך בחשבון Eversense שלך, שתוצג באפליקציה Eversense ובחשבון Eversense DMS שלך.

- עבור אל **My Account > About (אודות < החשבון שלי)** ולחץ על התמונה. אתה גם יכול ללחוץ על התמונה מן התפריט הראשי.
- עקוב אחר הדרישה בכדי לעדכן או למחוק את התמונה. אתה יכול לצלם תמונה חדשה או לבחור בתמונה קיימת השמורה בתוך המכשיר שלך.
- התמונה שתבחר תוצג במסך **Main Menu (התפריט הראשי)**.

**הערה:** אתה יכול גם לשנות את תמונת הפרופיל שלך מחשבון Eversense DMS שלך. ראה חלק *Eversense DMS* למידע נוסף.

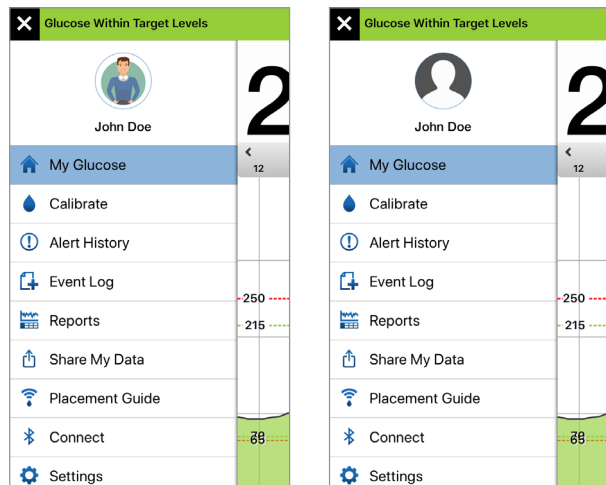

## במסך My Account (החשבון שלי), אתה יכול לערוך את תמונת הפרופיל שלך, לראות את כתובת הדוא"ל ששימשה ליצירת חשבון Eversense שלך ולצאת מאפליקציית Eversense.

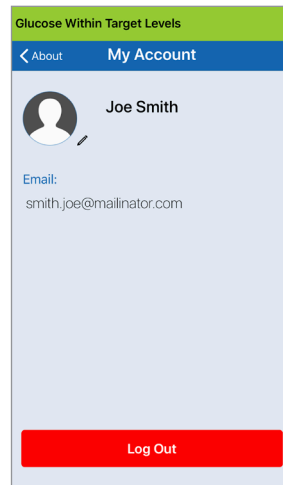


על מנת לקרוא את הסכם הרישיון עבור משתמש הקצה או את מדיניות הפרטיות, אנא בחר באופציה המתאימה.



על מנת למצוא את המפץ המקומי שלך באתר שלנו, לחץ על **Help** (עזרה).


אתה יכול גם למצוא משובים או לראות את הסכם הרישיון עבור משתמש הקצה ואת מדיניות הפרטיות מתפריט 'אודות'.

• לחץ על **Contact Us** (צור קשר) בכדי לשלוח הודעת דוא"ל אל צוות שירות הלקוחות המקומי שלך.

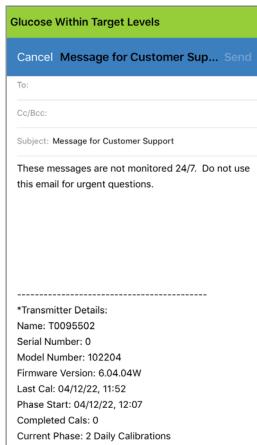

**חשוב:** אנו לא מנטרים כתובת דוא"ל זו 24 שעות ביממה. **נא לא** להשתמש בכתובת דוא"ל זו לעניינים בריאותיים או נושאים דחופים.

במסך **PRODUCT INFORMATION** (מידע על המוצר), אתה יכול למצוא מידע אודות גרסה התכנה של האפליקציה ואודות Senseonics, Inc. היצרן של מערכת Eversense E3 CGM.

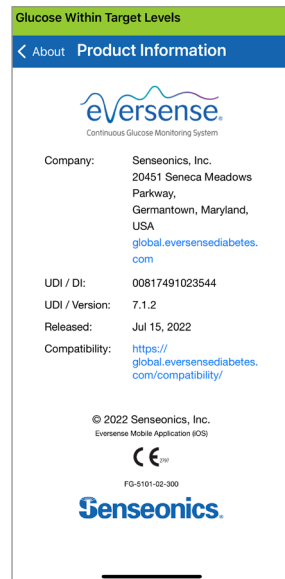

### Warning

If you logout, you won't be able to see glucose data on the Eversense App until you log back in. Are you sure you want to logout?

No

Yes

Glucose Within Target Levels

< About My Account



Joe Smith

Email:

smith.joe@mailinator.com

Log Out

## יציאה מן המערכת

על מנת לצאת מחשבון  
Eversense שלך, לחץ על  
**My Account > Log Out**  
(החשבון שלי < יציאה).

13

**חשוב:** אם תצא מן המערכת, לא יוצגו כל נתוני הסוכר על ידי האפליקציה עד אשר תיכנס חזרה אל המערכת על ידי שימוש בכתובת הדוא"ל והססמה אותם הזנת כאשר הגדרת את החשבון שלך.

# 14. לראות נתוני Eversense E3 על גבי שעון ה-Apple


אתה יכול לראות מבט מהיר של נתוני Eversense E3 CGM שלך על גבי שעון ה-Apple. לאחר שהורדת והתקנת את האפליקציה Eversense CGM על גבי המכשיר הנייד שלך, עקוב אחר ההוראות עבור שעון ה-Apple על מנת להוסיף את האפליקציה לשעון שלך.

שעון ה-Apple הוא תצוגה משנית של נתוני ה-Eversense E3 CGM ואין להשתמש בו כתחליף לתצוגה הראשונית של ה-Eversense E3 CGM.


כל בעיה עם המכשירים הניידים, האינטרנט האלחוטי, חיבורי הנתונים, מערכת ניהול הנתונים של Eversense (DMS), אם המשדר החכם של משתמש ה-CGM נמצא מחוץ לטווח המכשיר הנייד שלו, או טעינה של המכשיר החכם, יכולים לגרום לאיחור בהעברת הנתונים או לא להציג את הנתונים בכלל.

אם בשלב כלשהו תיתקל בתסמינים של רמה נמוכה או גבוהה של סוכר בדם או אם התסמינים שלך לא תואמים לקריאות הסוכר של החיישן, עליך לבדוק את הסוכר עם מד סוכר בדם לפני שתקבל החלטה טיפולית.


אתה יכול גם לגשת למסך **MY GLUCOSE (הסוכר שלי)** אם אתה מפעיל את ההודעות מן ה-Eversense E3 בהגדרות שעון ה-Apple שלך. כאשר אתה מקבל הודעה, אתה יכול גם ללחוץ על המסר על מנת לראות את מסך **MY GLUCOSE (הסוכר שלי)**.

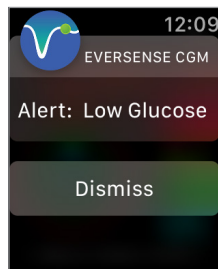


מסך **My Glucose (הסוכר שלי)** מראה את קריאת הסוכר הנוכחית שלך עם חץ מגמה וגרף מגמות עבור נתוני ה-CGM שלך השלוש השעות האחרונות.

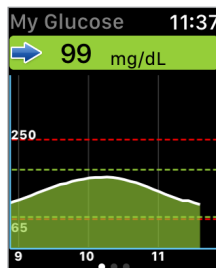


בכדי לגשת לתכונות נוספות של האפליקציה, לחץ על סמל **Eversense** במסך **HOME (בית)** של השעון כדי לפתוח את האפליקציה.

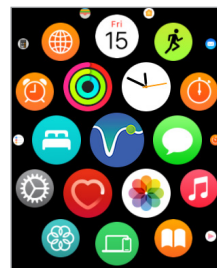


החלק שמאלה למסך הבא שבו מופיעים נתוני הסוכר הנוכחיים שלך עם חץ מגמה, זמן הכיול הבא שלך, שלב הכיול המוכחי של המערכת ורמת הסוללה של המשדר החכם שלך.

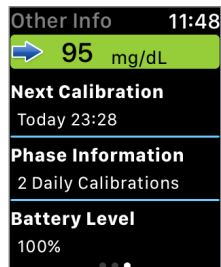

החלק למעלה על מנת לראות את אותם הנתונים המוצגים באחוזים.

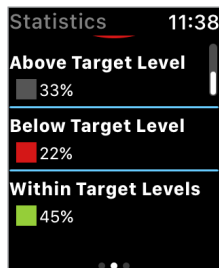

החלק שמאלה למסך הבא שבו מופיע תרשים עוגה של משרך הזמן הכולל בתוך טווח היעד ומחוצה לו, במשך 24 השעות האחרונות.


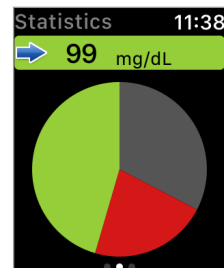


## התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple

שעון ה-Apple Watch הוא תצוגה משנית עבור האפליקציה Eversense CGM. את כל ההתרעות או ההודעות המתקבלות על גבי שעון ה-Apple יש לאשר על גבי האפליקציה Eversense CGM לפני נקיטת כל פעולה.

אם אתה מבטל התרעה על גבי השעון, תצוגת ההתרעה תיעלם ממסך הנעילה של הטלפון. לאחר פתיחת האפליקציה ההתרעה תוצג ביחד עם כל המידע הקשור אליה.

הטבלה הבאה מציגה את ההתרעות וההודעות אותן תוכל לקבל על גבי שעון ה-Apple מאפליקציית Eversense. חלק מן ההתרעות וההודעות תושפענה מהגדרות הצליל של האפליקציה ומפונקציית 'נא לא להפריע' באפליקציה. ראה *Setting Sounds* (הגדרות צליל) ו-*Alert Descriptions and Actions* (תיאור הפעולות התרעות) למידע נוסף.

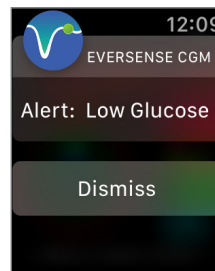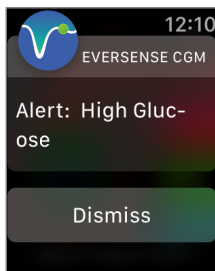

תצוגת שעון Apple

תיאור

פעולות

### High Glucose (סוכר גבוה)

מופיעה בטווח הזמן אותו הזנת בהגדרות הצליל כאשר קריאות הסוכר של החיישן שלך שווה או מעל לרמת ההתרעה עבור רמות סוכר גבוהות אותה הגדרת.

### Low Glucose (סוכר נמוך)



מופיעה בטווח הזמן אותו הזנת בהגדרות הצליל כאשר קריאות הסוכר של החיישן שלך שווה או מתחת לרמת ההתרעה עבור רמות סוכר נמוכות אותה הגדרת.

**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.



# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

תצורת שעון Apple		
תיאור	 <p><b>Out of Range Low Glucose</b> (סוכר נמוך מחוץ לטווח) מופיעה כאשר רמת הסוכר שלך נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל. לא ניתן להציג קריאות סוכר.</p>	 <p><b>Out of Range High Glucose</b> (סוכר גבוה מחוץ לטווח) מופיעה כאשר רמת הסוכר שלך גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל. לא ניתן להציג קריאות סוכר.</p>
פעולות	<p>אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. בדוק את רמת הסוכר שלך באופן ידני על ידי שימוש במד סוכר בדם. אשר תמיד את רמות הסוכר שלך על ידי סוכר בדם לפני כל החלטת טיפול. כאשר ערך רמת הסוכר המגיע מן החיישן יהיה 40 מ"ג/ד"ל או גבוה יותר, קריאות הסוכר יוצגו שוב.</p>	<p>אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. בדוק את רמת הסוכר שלך באופן ידני על ידי שימוש במד סוכר בדם. אשר תמיד את רמות הסוכר שלך על ידי סוכר בדם לפני כל החלטת טיפול. כאשר ערך רמת הסוכר המגיע מן החיישן יהיה 400 מ"ג/ד"ל או נמוך יותר, קריאות הסוכר יוצגו שוב.</p>

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

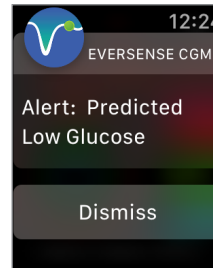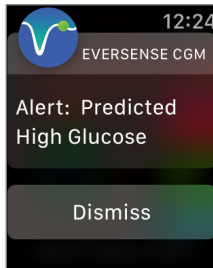

תצוגת שעון Apple

### Predicted High Glucose (סוכר חזוי גבוה)

מופיעה מדי 60 דקות כאשר מגמת ערכי הסוכר נמצאת בעלייה ותגיע לרמת ההתרעה על סוכר גבוה שהגדרת בתוך פרק הזמן שהזנת בהגדרות.

### Predicted Low Glucose (סוכר חזוי נמוך)

מופיעה מדי 60 דקות כאשר מגמת ערכי הסוכר נמצאת בירידה ותגיע לרמת ההתרעה על סוכר נמוך שהגדרת בתוך פרק הזמן שהזנת בהגדרות.

תיאור



**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

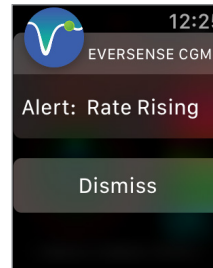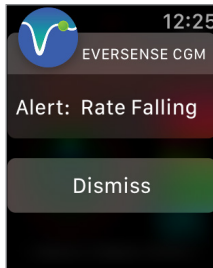

תצוגת שעון Apple

### Rate Falling (קצב ירידה)

מופיעה כל 60 דקות כאשר רמות הסוכר שלך נופלות בשיעור השווה או הגבוה מקצב השינוי אותו הזנת בהגדרות.

### Rate Rising (קצב עלייה)

מופיעה כל 60 דקות כאשר רמות הסוכר שלך עולות בקצב השווה או הגבוה מקצב השינוי אותו הזנת בהגדרות.

תיאור



**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** שים לב לרמות הסוכר שלך, תסמינים ומגמות. אם התסמינים אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, אשר את ערך הסוכר שלך באמצעות בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון Apple (המשך)

## התרעות

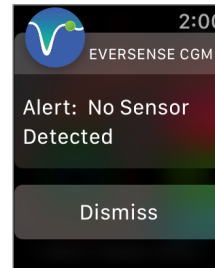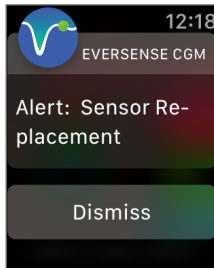

תצוגת שעון Apple

### Sensor Replacement (החלפת חיישן)

מופיעה כאשר הבדיקות העצמיות של המערכת מאתרות שהחיישן איננו מסוגל יותר לספק ערכי סוכר.

### No Sensor Detected (לא אותר חיישן)

מופיעה כאשר החיבור בין החיישן שלך והמשדר אבד. אין נתוני סוכר זמינים עד אשר מתבצע חיבור מחדש.

תיאור



אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת להחליף את החיישן שלך.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. כאשר אתה עושה שימוש במדריך המיקום לעיון, הנח את המשדר החכם מעל לחיישן עד אשר ניתן לראות שקיים חיבור.

פעולות



# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

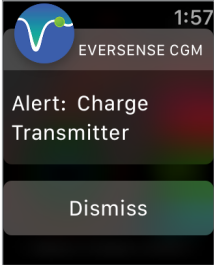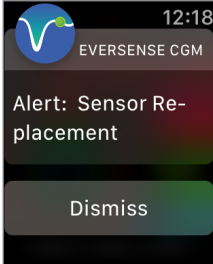		<p>תצוגת שעון Apple</p>
<p><b>Charge Transmitter (טען את המשדר)</b> מופיעה כאשר עוצמת סוללת המשדר החכם נמוכה מאוד ועליך לטעון את הסוללה בהקדם.</p>	<p><b>Sensor Replacement (החלפת חיישן)</b> מופיעה כאשר פג תוקפו של חיי החיישן. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד להחלפת החיישן.</p>	
<p>אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הטען את המשדר החכם שלך בהקדם האפשרי.</p>	<p>אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת להחליף את החיישן שלך.</p>	<p>פעולות</p>

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

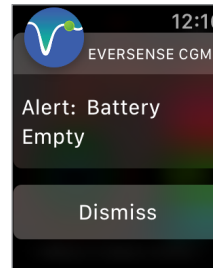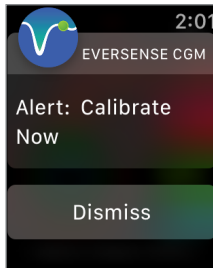

תצוגת שעון Apple

### Calibrate Now (כייל עכשיו)

מופיעה על מנת להתריע לך שהגיע הזמן לכיול. אם אתה לא מבצע כיול תוך 4 שעות, לא ניתן יהיה להציג קריאות סוכר.

### Battery Empty (סוללה ריקה)

מופיעה פעם אחת כאשר סוללת המשדר החכם ריקה ויש לטעון אותה. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר לא תתבצע טעינה של המשדר החכם.

תיאור



אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. לחץ על **Calibrate** (כייל) באפליקציה שלך בכדי להזין ערך כיול.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הטען את המשדר החכם מיד. הסר את המשדר החכם מן הגוף שלך לפני חיבורו למקור מתח.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

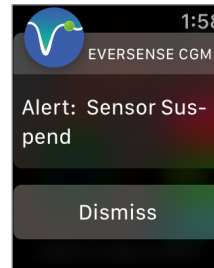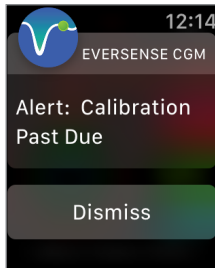

תצוגת שעון Apple

### Calibration Past Due (איחור בכיול)

מופיעה כאשר המערכת מאתרת שעבר זמן הכיול.

לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר יוזן ערך כיול באפליקציה Eversense CGM.

### Sensor Suspend (השעיית חיישן)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת צורך להתחיל מחדש את שלב האתחול עבור בדיקות כיול נוספות. קריאות רמות הסוכר תוצגנה שוב כמה דקות לאחר ביצוע מוצלח של בדיקת הכיול השנייה של שלב האתחול.

תיאור



אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. בצע בדיקת כיול בעזרת דם מהאצבע על מנת להציג שוב את קריאות הסוכר שלך.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. אתחול מחדש של המערכת יחל בעוד 6 שעות.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

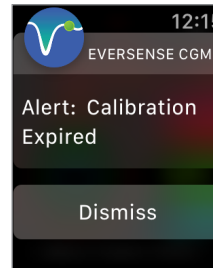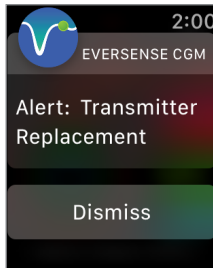

תוצות שעון Apple

### Transmitter End of Life 366 (סיום חיי המשדר יום 366)

מופיעה כאשר המשדר שלך כבר היה בשימוש 365 ימים ואחריות המשדר שלך הסתיימה. לאחר 395 ימי שימוש, המשדר שלך לא יספק יותר קריאות סוכר.

### Calibration Expired (פג תוקף הכיול)

מופיעה כאשר לא התבצע כיול במהלך 24 השעות האחרונות. המערכת חוזרת לשלב האתחול. לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר יוזן ערך כיול באפליקציה Eversense CGM.

תיאור

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.



### אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM

בשלב האתחול, עליך לבצע 4 בדיקות כיול בעזרת דם מהאצבע במרווחים של שתיים עד 12 שעות. קריאות רמות הסוכר תוצגנה שוב לאחר ביצוע מוצלח של הכיול השני בעזרת דם מהאצבע.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

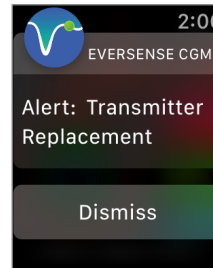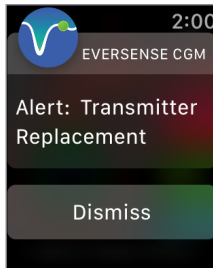

תצוגת שעון Apple

### Transmitter End of Life 396 (סיום חיי המשדר יום 396)

מופיעה כאשר נעשה שימוש במשדר שלך במשך 395 ימים.

לא ניתן להציג קריאות סוכר עד אשר תחליף את המשדר שלך.

### Transmitter End of Life 395 (סיום חיי המשדר יום 395)

מופיעה לאחר שאחריות המשדר שלך הסתיימה לפני יותר מ-30 ימים.

לא ניתן להציג קריאות סוכר לאחר תאריך התרעה זו עד אשר תחליף את המשדר שלך.

תיאור



**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.

**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

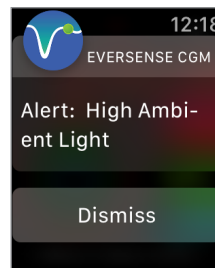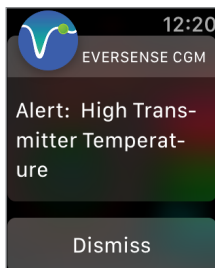

תצוגת שעון Apple

### High Transmitter Temperature (טמפרטורה גבוהה של המשדר)

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של המשדר החכם גבוהה מדי.

לא מוצגות קריאות סוכר עד אשר טמפרטורת המשדר החכם חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.

### High Ambient Light (תאורת סביבה חזקה)

מופיעה כל 60 דקות כאשר החיישן שלך מקבל יותר מדי תאורת סביבה, דבר המשפיע על היכולת שלו לתקשר עם המשדר החכם.

לא ניתן להציג קריאות סוכר עד להפחתת עוצמת תאורת הסביבה.

תיאור

### אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הפחת את טמפרטורת המשדר החכם על ידי הזנתו למקום קריר יותר. לאחר שהטמפרטורה של המשדר החכם תגיע אל מתחת ל-42 °C (108 °F), הוא יחזור ויציג ערכי קריאות סוכר. אתה יכול להסיר באופן זמני את המשדר החכם על מנת לקרר אותו. לאחר שטמפרטורת המשדר החכם ירדה, הנח אותו שוב מעל לחיישן.



### אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הפחת את עוצמת תאורת הסביבה בביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- זוז לאזור אשר פחות חשוף לאור.
- הנח פיסת בד כהה מעל למשדר החכם.
- לבש את המשדר החכם מתחת לבגדים.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

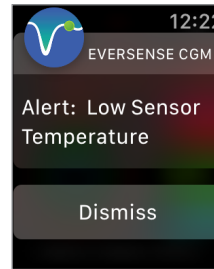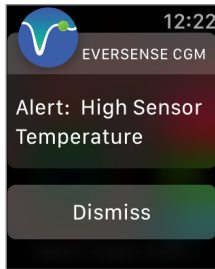

תצוגת שעון Apple

### High Sensor Temperature (טמפרטורת חיישן גבוהה)

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של החיישן גבוהה מדי.  
לא מוצגות קריאות סוכר עד אשר טמפרטורת החיישן חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.

### Low Sensor Temperature (טמפרטורת חיישן נמוכה)

מופיעה כל 20 דקות כאשר הטמפרטורה של החיישן נמוכה מדי.  
לא מוצגות קריאות סוכר עד אשר טמפרטורת החיישן חוזרת לטווח טמפרטורות הפעולה הנורמלי.

תיאור



**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** עבור לסביבה קרה יותר על מנת להפחית את טמפרטורת החיישן שלך. הסר לזמן קצר את המשדר החכם שלך עד אשר טמפרטורת תימצא בטווח  $26 - 40^{\circ}\text{C}$  ( $81^{\circ}\text{F}$ ) - לאחר מכן החזר את המשדר החכם למקומו על מנת להתחיל לקבל קריאות רמות סוכר מן החיישן.

**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** עבור לסביבה חמה יותר על מנת להעלות את טמפרטורת החיישן שלך. וודא שהמשדר החכם שלך מופעל על מנת שתוכל להתחיל ולקבל רמות קריאות סוכר כאשר טמפרטורת החיישן נמצאת בטווח  $26 - 40^{\circ}\text{C}$  ( $81 - 104^{\circ}\text{F}$ ).

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

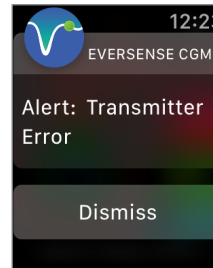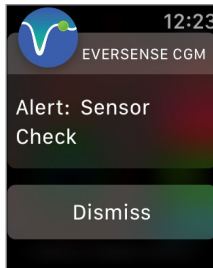

תצוגת שעון Apple

### Sensor Check (בדיקת חיישן)

מופיעה פעם אחת כאשר הבדיקות הפנימיות של המערכת מזהות חוסר יציבות של החיישן שמחייבת חזרה לשלב אתחול הכיול.

### Smart Transmitter Error (שגיאת משדר חכם)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת שגיאת משדר החכם. לא מוצגות קריאות סוכר עד שהשגיאה תתוקן.

תיאור



אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. בשלב האתחול, עליך לבצע 4 בדיקות כיול בעזרת דם מהאצבע במרווחים של שתיים עד 12 שעות. קריאות רמות הסוכר תוצגנה שוב לאחר ביצוע מוצלח של הכיול השני בעזרת דם מהאצבע.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. עקוב אחר הצעדים המוצגים בחלק איתור וטיפול בבעיות על מנת לאתחל את המשדר החכם שלך. אם איך מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר עם שירות לקוחות.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

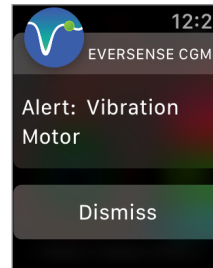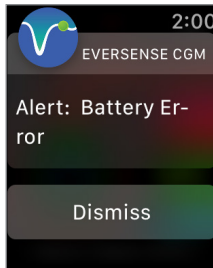

תצוגת שעון Apple

### Battery Error (שגיאת סוללה)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת שגיאת סוללה במשדר החכם שלך. קריאות הסוכר תהיינה מוצגות אבל יהיה צורך להחליף את המשדר החכם שלך.

### Vibration Motor (מנוע רטט)

מופיעה כל 60 דקות כאשר מנוע הרטט על גבי המשדר החכם שלך לא יכול לספק יותר התרעות רטט על הגוף. אתה תמשיך לקבל קריאות רמות סוכר עד לכ-72 שעות לאחר קבלת המסר. לאחר 72 שעות, אתה תקבל התרעת שגיאת משדר חכם כל 20 דקות עד אשר תחליף את המשדר החכם.

תיאור



**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.

**אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM.** צור קשר עם שירות הלקוחות על מנת להחליף מיד את המשדר החכם שלך.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

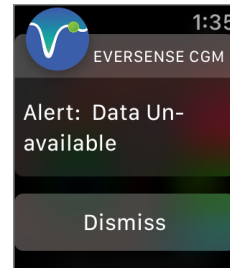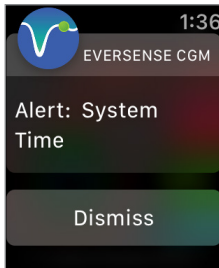

תצוגת שעון Apple

### System Time Error (שגיאת זמן מערכת)

מופיעה כאשר המערכת שלך מאתרת אי התאמה בין שעון המכשיר הנייד שלך ושעון המערכת.

### Data Unavailable (נתונים לא זמינים)

מופיעה כאשר הבדיקה הפנימית של המערכת מאתרת שגיאת מערכת. לא מוצגות קריאות סוכר עד שהשגיאה תתוקן.

תיאור



אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הגדר את שעון המכשיר הנייד שלך אל הזמן המקומי. אם הנושא ממשיך, צור קשר עם שירות הלקוחות.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. חבר את עריסת הטעינה באמצעות כבל אל שקע קיר או יציאת USB. הנח את המשדר החכם בתוך העריסה והסר אותו. אם הבעיה ממשיכה, עקוב אחר הצעדים המוצגים בחלק איתור וטיפול בבעיות על מנת לאתחל את המשדר החכם שלך. אם איך מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר עם שירות

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## התרעות

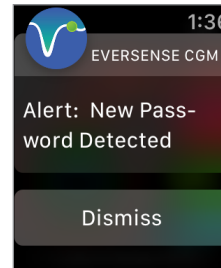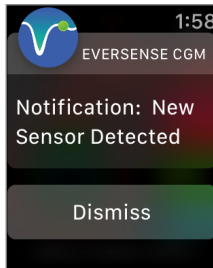

תצוגת שעון Apple

תיאור

פעולות

### New Sensor Detected (זוהר חיישן חדש)

מופיעה כאשר המשדר החכם מאתר חיישן חדש. יש לקשר בין החיישן והמשדר החכם על מנת להתחיל בתקשורת.

### New Password Detected (זוהרה ססמה חדש)

מופיעה כאשר המערכת מאתרת שינוי של ססמה באמצעות חשבון ה-Eversense של DMS שלך.



### אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. באפליקציה שלך, לחץ על Link

**Sensor (קשר חיישן)** על מנת להשלים את תהליך הקישור ולהתחיל את תקופת החימום הנמשכת 24 שעות. אינך צריך לשאת את המשדר החכם שלך מעל לחיישן עד לסיימה של תקופת החימום.

### אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. צא מן האפליקציה וכנס אליה חזרה עם הססמה החדשה.

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## הודעות

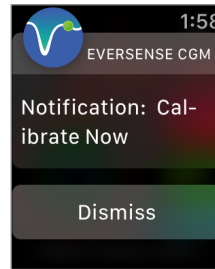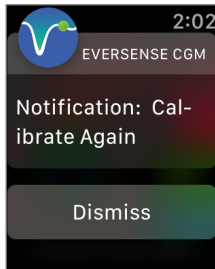

תצוגת שעון Apple

### Calibrate Again (כייל שוב)

מופיעה כאשר לא נאספו נתונים מספיקים במהלך הכיול.

### Calibrate Now (כייל עכשיו)

מופיעה כאשר הגיע הזמן לכייל כאשר המערכת נמצאת בשלב האתחול או לאחר שהוזן ערך כיול אשר מאוד שונה מערך הסוכר בחייוש.

תיאור



אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. לחץ על **Calibrate** (כייל) באפליקציה שלך בכדי להזין ערך כיול חדש.

אשר את ההתרעה באפליקציה **Eversense CGM**. בצע בדיקת רמת סוכר בעזרת דם מהאצבע והזן את הקריאה כערך הכיול שלך. אל תשתמש בקריאת דגימה ממקום אחר (כגון אמת היד) לקבלת קריאות הסוכר בדם שלך.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## Notifications (הודעות)

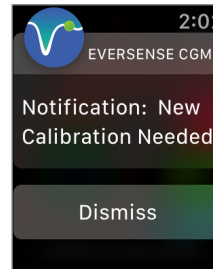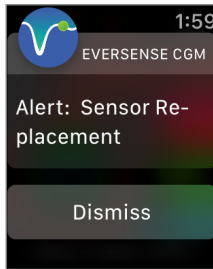

תצוגת שעון Apple

### Sensor Replacement (החלפת חיישן)

מופיעה 3, 7, 14, 30, 60 יום אחד לפני סיום תקופת הנשיאה של החיישן שלך כתזכורת שאתה צריך להחליף את החיישן שלך.

### New Calibration Needed (יש צורך בכיול חדש)

מופיעה כאשר ערך הכיול שהזנת שונה באופן מאוד מערך רמת הסוכר שלך שאותרה על ידי החיישן. לאחר 60 דקות, אתה תקבל הודעת כייל עכשיו.

תיאור



אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת לקבוע תור להסרת החיישן והחלפתו.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הזן ערך כיול חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

פעולות

# התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

## Notifications (הודעות)

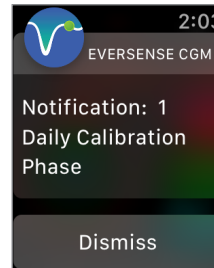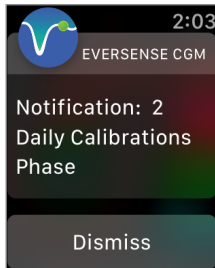

תצוגת שעון Apple

### 2 Daily Calibrations (2 כיולים ביום)

מופיעה כאשר המערכת מצריכה כיול פעמיים ביום.

### 1 Daily Calibration (כיול 1 יומי)

מופיעה כאשר המערכת מצריכה כיול פעם אחת ב-24 שעות.

תיאור


אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הזן ערך כיול חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. הזן ערך כיול חדש כאשר תתבקש לעשות זאת.

פעולות

## התרעות והודעות המופיעות על גבי שעון ה-Apple (המשך)

### Notifications (הודעות)

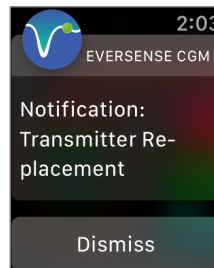

תצוגת שעון Apple

#### Transmitter End of Life Day 330 (סיום חיי המשדר יום 330)

מופיעה פעם אחת 35 ימים לפני סיום אחריות המשדר.

תיאור

אשר את ההתרעה באפליקציה Eversense CGM. צור קשר עם המפיץ שלך על מנת להזמין משדר חדש.

פעולות

# 15. המעגל שלי

## ניטור מרחוק באמצעות מערכת Eversense E3 CGM ואפליקציית Eversense NOW

אפליקציית Eversense CGM כוללת מאפיין אופציונלי של ניטור מרחוק. אפליקציית Eversense CGM מתקשרת עם אפליקציית Eversense NOW לניטור מרחוק על מנת לאפשר לאנשים אחרים לראות את הנתונים שלך.

### סיכונים

ייתכן ותהיינה פעמים בהן נתוני הסוכר שלך של יישלחו לאפליקציית Eversense NOW. אם חבר במעגל שלך איננו מקבל נתונים ממערכת Eversense E3 CGM, הוא לא יוכל לעזור לך במקרים של רמות סוכר גבוהות או נמוכות. התצוגה המשנית וההודעות על גבי אפליקציית Eversense NOW אינן מחליפות את התצוגה הראשונית של אפליקציית מערכת Eversense CGM שלך.

ייתכן ולחברים במעגל שלך לא יהיה תמיד חיבור על מנת לתמוך בהעברת נתונים כגון חיבור אינטרנט/אינטרנט אלחוטי או 3G/4G/LTE. אם לחבר מן המעגל שלך אין חיבור לאינטרנט, נתוני הסוכר שלך לא יהיו זמינים על גבי התצוגה המשנית. כל בעיה עם המכשירים הניידים, האינטרנט האלחוטי, חיבורי הנתונים, מערכת ניהול הנתונים של Eversense (DMS), אם המשדר החכם נמצא מחוץ לטווח המכשיר הנייד שלו, או טעינה של המכשיר החכם, יכולים לגרום לנתונים שלך לא להיות מוצגים לחברי המעגל שלך. אתה לא צריך להסתמך על אנשים המנטרים מרחוק את נתוני הסוכר שלך במקרים של קריאות סוכר נמוכות או גבוהות.

מאפיין הניטור מרחוק מספק תצוגה משנית של הודעות ונתונים לאלו הנמצאים במעגל שלך. זוהי איננה מערכת ניטור מרחוק בזמן אמת.

### הטבות

מערכת Eversense E3 CGM שנמצאת בשימוש עם אפליקציית ה-Eversense NOW לניטור מרחוק יכולה לספק למשתמשי ה-CGM ביטחון נוסף, כאשר הם מודעים לעובדה שאחרים יכולים גם לראות את נתוני ה-CGM שלהם.

## אזהרות

- אין להשתמש בנתוני סוכר המוצגים על גבי אפליקציית Eversense NOW על מנת לבצע החלטות טיפול. השתמש תמיד בערכי קריאות הסוכר בדם על מנת לבצע החלטות טיפול. שימוש בערך סוכר של החיישן לקבלת החלטה לגבי טיפול עלול לגרום לרמת סוכר בדם גבוהה או נמוכה בדם. נתוני אפליקציית Eversense NOW מהווים תצוגה משנית של נתוני Eversense E3 CGM ואין להשתמש בהם במקום התצוגה הראשונית של Eversense E3 CGM.
- אתה לא צריך להסתמך על אנשים המנטרים מרחוק את נתוני הסוכר שלך במקרים של קריאות סוכר נמוכות או גבוהות.

## אמצעי זהירות

- האפליקציה למכשיר נייד Eversense NOW איננה מחליפה את משטר הניטור אשר ניתן ישירות על ידי הצוות הרפואי שלך.
- אם פונקציית הסנכרון האוטומטי (המאפיין המאפשר שליחת נתונים אוטומטית לאפליקציית Eversense NOW שלך) איננה מופעלת, אתה לא תוכל לשתף נתונים עם חברי המעגל שלך והם לא יראו מגמות או אירועים של רמות סוכר נמוכות או גבוהות.
- אם לך או לחברי המעגל שלך אין חיבור לאינטרנט, או אם המכשיר הנייד כובה בשל מחת סוללה נמוך או סוללה ריקה, נתוני Eversense E3 CGM שלך לא יוצגו על גבי אפליקציית Eversense NOW.
- אם חברי המעגל שלך מכבים את הצלילים במכשירים הניידים שלהם, הם לא יוכלו לשמוע התרעות צליל בנוגע לנתוני CGM שלך על גבי אפליקציית Eversense NOW שלהם.
- אם תגדיר את הסטטוס שלך לאוף-ליין עם כל אחד מן החברים במעגל שלך, הם לא יקבלו את נתוני ה-CGM שלך על גבי אפליקציית Eversense NOW שלהם. אל תגדיר את הסטטוס שלך לאוף-ליין אם אתה רוצה שחברים במעגל שלך יקבלו את נתוני ה-CGM שלך.
- אפליקציית Eversense NOW איננה מתקשרת באופן ישיר E3 עם חיישן Eversense /או עם המשדר החכם Eversense.
- אפליקציית Eversense NOW לא יכולה לשנות את ההגדרות של אפליקציית Eversense CGM שלך.



## אמצעי זהירות (המשך)

- אם משתמש Eversense NOW איננו מאפשר הודעות מאפליקציית Eversense NOW, הוא לא יקבל התרעות סוכר מוך.
- אם המכשיר הנייד שלך נמצא במצב 'נא לא להפריע', אתה לא תוכל לשמוע הודעות המגיעות מאפליקציית Eversense NOW.

דרך מסך **MY CIRCLE (המעגל שלי)** באפליקציה Eversense XL במכשיר הנייד שלך, אתה יכול להזמין עד חמישה אנשים על מנת לראות את הנתונים שלך. כאשר אתה מזמין מישהו להצטרף אל המעגל שלך, ההזמנה תישלח באמצעות כתובת הדוא"ל אותה הזנת. לאחר שההזמנה התקבלה ומתבצעת הורדה של אפליקציית Eversense NOW, חברים במעגל שלך יכולים לראות את נתוני הסוכר האחרונים שלך, אירועים והתרעות.

**חשוב:** חברים במעגל שלך להם אין את אפליקציית Eversense NOW לא יוכלו לראות את הנתונים שלך.

בכל זמן בו לאפליקציית מערכת Eversense CGM ולאפליקציית Eversense NOW שלך יש חיבור לאינטרנט, מתבצע סנכרון של נתוני הסוכר שלך אל אפליקציית Eversense NOW בערך כל 5 דקות. סנכרון של נתוני כיול יתבצע לאט יותר באפליקציית Eversense NOW.

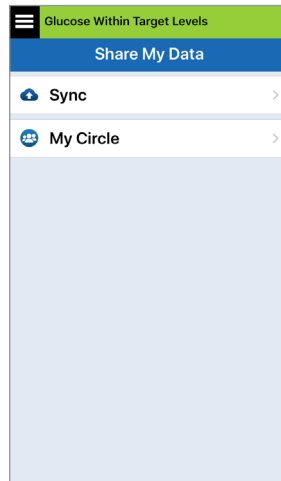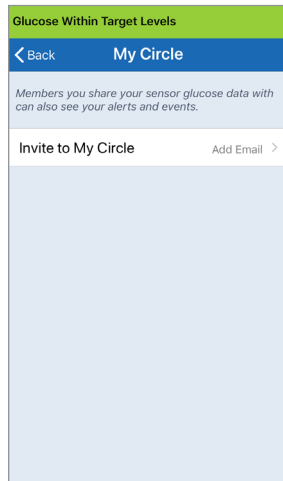


**הערה:** אם נטרלת את אפשרות הסנכרון האוטומטי, נתוני הסוכר שלך לא יהיו זמינים באפליקציית Eversense NOW לניטור מרחוק.



**1.** מן התפריט הראשי, לחץ על **Share My Data > My Circle (שתף את הנתונים שלי < המעגל שלי)** על מנת להציג את מסך **MY CIRCLE (המעגל שלי)**.

**2.** על מנת להזמין חבר חדש לראות את נתוני הסוכר שלך, לחץ על **Invite to My Circle (הזמן למעגל שלי)**.

#### 4. מופיע מסך בו רואים שהזמנה נשלחה. לחץ על OK (אישור).

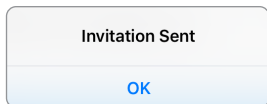


לאחר שההזמנה התקבלה, שם החבר יופיע ברשימת החברים על גבי מסך MY CIRCLE (המעגל שלי) באפליקציה שלך.

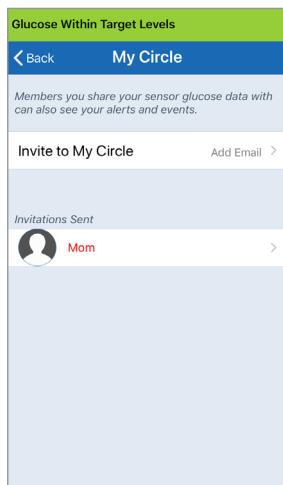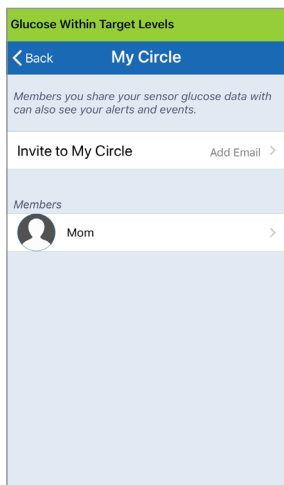

**הערה:** תמונות פרופיל עבור אלו המנטרים מרוחק את רמות הסוכר שלך נקבעים בחשבון ה-DMS על ידי בעל החשבון. אתה לא יכול לשנות את תמונות הפרופיל עבור האנשים אותם הזמנת אל המעגל שלך.




3. הזן את כתובת הדוא"ל של האדם אותו אתה רוצה להזמין אל המעגל שלך, ולאחר מכן לחץ על **Send (שליחה)** לאחר ההשלמה.

**הערה:** אתה יכול ללחוץ על ה-"+" ליד שדה כתובת הדוא"ל על מנת לבחור כתובת דוא"ל מרשימת אנשי הקשר שלך.

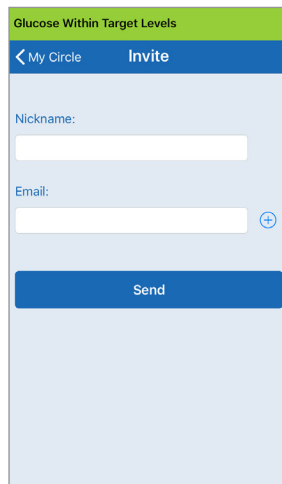


**עצה:** כינויים הם אופציונליים, וניתן להשתמש בהם על מנת לנהל בקלות את חברי המעגל שלך. אם אתה בוחר לא להעניק כינוי לחבר מן המעגל שלך, כתובת הדוא"ל שלו תוצג במקום הכינוי.

**2.** לחץ על **Remove** (הסרה) על מנת להסיר חבר מן המעגל שלך. לחץ על **Yes** (כן) כאשר תתבקש לעשות זאת.

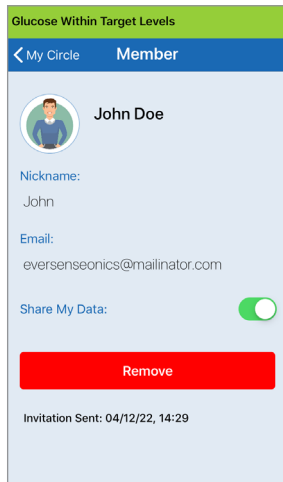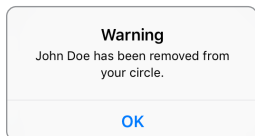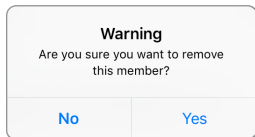

**1.** על מנת להסיר חבר או הזמנה, לחץ על שם החבר ברשימת החברים או ברשימת ההזמנות שנשלחו במסך **MY CIRCLE** (המעגל שלי).

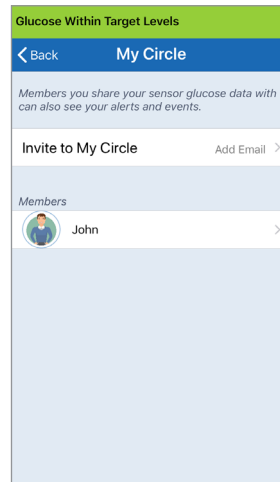



החבר אותו הסרת יקבל הודעה על גבי אפליקציית Eversense NOW שלו אם הוא כבר קיבל את ההזמנה.

## הפסקה זמנית של שיתוף הנתונים

ייתכן ותהיינה תקופות בהן תרצה להפסיק באופן זמני את שיתוף הנתונים שלך עם חבר מסוים, אך לא תרצה להסיר אותו מן המעגל שלך.

1. לחץ על שם החבר ברשימת המעגל שלי על מנת לפתוח את מסך **MEMBER (חבר)**.

2. לחץ על לחצן **Share My Data (שיתוף הנתונים שלי)** על מנת להפעיל/לכבות שיתוף נתונים עם חבר זה.

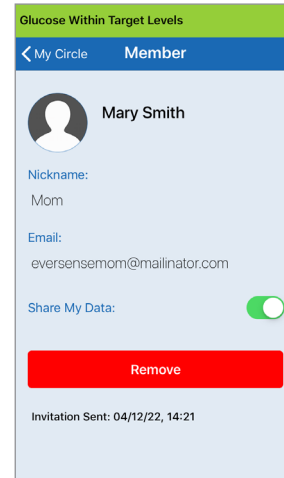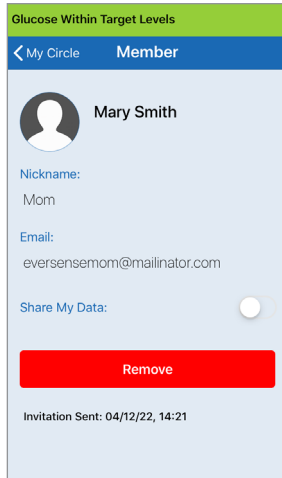

15

**חשוב:** אם נטרלת את מאפיין שתף את הנתונים שלי עבור חבר מסוים, חבר זה לא יוכל לראות נתוני סוכר ממערכת Eversense E3 CGM שלך, התרעות או היסטוריית אירועים. החברים יראו את הסטטוס שלך כאוף-ליין באפליקציית Eversense NOW שלהם כאשר נטרלת את מאפיין שתף את הנתונים שלי. ייתכן שיחלפו עד 10 דקות עד שהשינוי יוצג באפליקציה של משתמש Eversense NOW.

**הערה:** משתמש Eversense NOW יכול גם להסיר אותך מן האפליקציה שלו. ייתכן שייקח שעותיים עד ששינויים אלה יוצגו באפליקציית Eversense CGM שלך.

למידע נוסף אודות אפליקציית Eversense NOW, אנא עיין בחלק Eversense NOW.

# 16. אודות החיישן

חלק זה מתאר את חיישן Eversense E3 וכיצד הוא מוחדר על ידי הצוות הרפואי שלך



חיישן Eversense E3

חיישן Eversense E3 הוא פלואורומטר ממוזער המשתמש בעוצמת פלואורסצנט כדי למדוד סוכר בנוזל הבין-תאי. החיישן מושתל באופן תת-עורי (מתחת לעור) בחלק העליון של הזרוע, כאשר אף חלק של החיישן אינו בולט מחוץ לעור. החיישן נשאר במקומו ומספק נתוני CGM (ניטור סוכר רציף) במהלך תקופה של 180 ימים.

החיישן ארוז בחומר בעל תאימות ביולוגית והוא משתמש בפולימר פלואורסצנטי ייחודי המראה את רמת הסוכר. דידה פולטת אור המורכבת בתוך החיישן מגרה את הפולימר ולאחר מכן הפולימר מאותת לגבי שינויים בריכוז הסוכר דרך שינוי בפלט האור. המדידה נשלחת לאחר מכן אל המשדר החכם. המדידות מושלמות באופן אוטומטי ואינן דורשות כל פעולה מצד המשתמש.

מידות החיישן הן בערך 3.5 מ"מ על 18.3 מ"מ ויש לו טבעת סיליקון המכילה כמות קטנה של דקסמתזון אצטט, תרופה סטרואידית אנטי-דלקתית. חומר הדקסמתזון אצטט מפחית את התגובות הדלקתיות, בדומה להתקנים רפואיים אחרים, כגון קוצבי לב.

## שלבי החדרה

הצוות הרפואי שלך יסביר לך ויבצע את השלבים הקלים והמהירים על מנת להחדיר את החיישן. אתה תהיה עד לגמרי במהלך כל הליך ההחדרה האורך כ-5 דקות.

### מיקום ההחדרה:

חשוב מאוד לבחור במיקום על גבי הזרוע העליונה בו יהיה לך נוח להחדיר את החיישן ולשאת את המשדר החכם לתקופה של עד 180 ימים. מומלץ להחדיר את החיישן לעבר החלק האחורי של החלק העליון של הזרוע שלך. מיקום במקום זה מפחית את הסיכוי שהחיישן או המשדר החכם ייתקלו בדלתות, קירות או מעברים צרים. אם ניתן, יש להימנע מאזורים עם עור רפוי, צלקות, קעקועים, שומות או כלי דם שעלולים להיחתך במהלך הפרוצדורה. בהחדרות חוזרות מומלץ להחליף את מיקום ההחדרה לזרוע השנייה.

**שלב 1: הכנת המקום** – מקום ההחדרה ינוקה, יחוטא ויורדם בעזרת לידוקאין.

**שלב 2: חתך** – חתך קטן (של פחות מסנטימטר) יבוצע במקום ההחדרה.

**שלב 3: החדרת החיישן** – כיס תת עורי ייוצר מתחת לעור והחיישן יוחדר אל כיס זה.

**שלב 4: סגירת אתר** – החתך ייסגר באמצעות תחבושת נדבקת. בדרך כלל נעשה שימוש ב-Steri Strips™ בכדי לסגור את החתך.

**שלב 5: קישור החיישן אל המשדר החכם** – קשר בין החיישן למשדר החכם כדי להתחיל בשלב החימום בן 24 השעות.

**הערה: לאחר ההחדרה, קשר בין החיישן אל המשדר החכם ולאחר מכן אפשר למקום ההחדרה להירפא 24 שעות לפני הנחה של המשדר החכם.**

לוקח לחיישן 24 שעות להתייצב בתוך מקום ההחדרה, תקופה זו ידועה כתקופת החימום. לאחר 24 שעות ממועד ההחדרה, מקם והצמד את המשדר החכם מעל החיישן כדי להבטיח שיש חיבור ביניהם (ראה הנחה יומית של המשדר). לאחר מכן תוכל לבצע את כיוול השלב הראשון של 4 בדיקות סוכר בדם באמצעות דגימת דם מהאצבע כדי להתחיל לקבל קריאות סוכר.

## שלבי הסרה

בדומה לשלבי ההחדרה, הצוות הרפואי יסביר את השלבים המהירים והפשוטים להסרת החיישן, ותהיה ער לחלוטין במהלך תהליך ההסרה בן 5 הדקות (בערך).

שלב 1: **הכנת המקום** – האתר שבו יוחדר החיישן ינוקה, יחוטא ויורדם באמצעות לידוקאין.

שלב 2: **חתך** – חתך קטן (של פחות מ-1 ס"מ) יבוצע באתר החיישן.

שלב 3: **הסרת החיישן** – החיישן יוסר ויזרק.

שלב 4: **סגירת המקום** – לאחר ההסרה, החתך ייסגר עם תחבושת SteriStrips™ (ניתן יהיה להשתמש בתפרים בהתאם להעדפת הצוות הרפואי).

# 17. נסיעות

חלק זה מתאר את נושאי הבטיחות בעת נסיעה עם המשדר החכם והחיישן Eversense E3 השייכים לך.

בעת נסיעה, ניתן לעבור בנקודות הביקורת בשדות התעופה עם המשדר החכם והחיישן שלך. אתה יכול להודיע לקצין הבטיחות שיש לך התקן רפואי מושתל.

המשדר החכם שלך יבצע סנכרון אוטומטי לתאריך והשעה הנוכחיים של הטלפון החכם שלך, כאשר מתבצע שינוי של אזורי זמן.

מערכת Eversense E3 CGM בטוחה לשימוש בכל קווי הטיסה המסחריים בתוך ארה"ב. המשדר החכם Eversense E3 הוא התקן רפואי נישא (M-PED) עם רמות פליטה העומדות בתקני ה-FAA לשימוש בכל המצבים במהלך טיסה. (לעיון בהמלצות ה-FAA, חוזר מס' 21-16G, מתאריך ה-22 ביוני 2011). לשימוש, הפעל את מאפיין ה-Bluetooth לאחר שהעברת את המכשיר הנייד שלך למצב טיסה. עבור טיסות מחוץ לארה"ב, עקוב אחר תקנות הבטיחות המקומיות בנוגע לשימוש בהתקנים רפואיים במהלך טיסה.

# 18. איתור וטיפול בבעיות

חלק זה כולל מידע בנוגע לאיתור וטיפול בבעיות עבור מערכת Eversense E3 CGM שלך וכולל רשימה של שאלות שכיחות (FAQ).

## משדר חכם

**ש: איך אני מכבה את המשדר החכם שלי?**

**ת:** לחצן והחזק את לחצן ההפעלה של המשדר החכם למשך 5 שניות. שחרר את הלחצן כאשר המשדר החכם מתחיל לרטוט.

**ש: איך אני מפעיל את המשדר החכם שלי?**

**ת:** לחצן והחזק את לחצן ההפעלה של המשדר החכם למשך 5 שניות. שחרר את הלחצן כאשר המשדר החכם מתחיל לרטוט.

**ש: איך אני ממקם כהלכה את המשדר החכם שלי מעל לחיישן?**

**ת:** ישנן שתי דרכים להבטיח מיקום מתאים:

1. בעת השימוש במדבקה על מנת להחזיק את המשדר החכם במקומו, וודא שסימן לחצן ההפעלה ונורית החיווי מיושרים במקביל לזרוע שלך.

2. השתמש במסך **PLACEMENT GUIDE**

(**מדריך מיקום**) על גבי האפליקציה על מנת לאשר את החיבור בין החיישן והמשדר.

- לחץ על **Placement Guide (מדריך מיקום)**.
- מקם את המשדר החכם מעל לחיישן כך שיתקבל אישור של החיבור.

**הערה:** למידע נוסף אודות חוזק האות והעמדת המשדר, ראה **מדריך מיקום – מסך פרטים נוספים** בחלק **קישור החיישן**.

**ש: המשדר החכם שלי איננו רוטט. מדוע?**

**ת:** אם המשדר החכם איננו רוטט, נסה את הצעדים הבאים:

- וודא שהמשדר החכם מקושר אל המכשיר הנייד שלך.

• ודא שמצב **Do Not Disturb**

(**נא לא להפריע**) מנוטרל על ידי לחיצה

על **Menu > Settings > Sound**

**Settings (תפריט < הגדרות < הגדרות צליל)**.

• וודא שלמסדר החכם שלך יש מספיק מתח בסוללה והטען אותו אם יש צורך בכך.

אם המסדר החכם עדיין איננו רוטט, צור קשר עם שירות הלקוחות או המפיץ המקומי שלך לפתרונות נוספים.

### ש: האם אני יכול להסיר ולהניח מחדש את אותה המדבקה מספר פעמים ביום?

ת: הסרה והנחה מחדש החוזרות על עצמן עלולות להפחית את חוזק ההדבקה.

### ש: מהו המספר הסידורי והדגם של המסדר החכם שלי?

ת: אתה יכול למצוא את המספר הסידורי והדגם של המסדר החכם שלך בחלק האחורי של המסדר החכם שלך. לאחר שחיברת בין המסדר החכם למכשיר הנייד, אתה יכול גם למצוא את המספר הסידורי והדגם על ידי לחיצה על **Menu > About > My Transmitter** (תפריט < אודות < המסדר שלי).

### ש: איך אני מתאים אישית את שמו של המסדר החכם שלי?

ת: לחץ על **Menu > Settings > System** **Transmitter Name** (תפריט < הגדרות < שם המסדר). הזן את השם הרצוי. השם המעודכן של המסדר החכם יופיע במסך סטטוס החיבור שלך.

### ש: למה נורית החיווי על גבי המסדר החכם שלי דולקת באור כתום מתמשך?

ת: עקוב אחר הצעדים למטה על מנת לטפל במסדר החכם:

1. וודא שהמסדר החכם מחובר אל המכשיר הנייד.
2. וודא שהמסדר החכם טעון.
3. בדוק אם יש התרעות או הודעות באפליקציה שלך.
4. הסר את המסדר החכם מן הזרוע שלך והמתן כמה דקות. מסר **No Sensor Detected** (לא זוהה חיישן) יופיע והמסדר החכם אמור לרטוט בתדירות גבוהה יותר ככל שהוא מחפש חיישן.

אם המסדר החכם איננו רוטט או שהאפליקציה איננה מציגה מסר **No Sensor Detected** (לא זוהה חיישן), צור קשר עם שירות הלקוחות בארה"ב. מחוץ לארה"ב, צור קשר עם המפיץ המקומי שלך. הנח שוב את המסדר החכם מעל לחיישן לראות עם נורית החיווי הכתומה נכבית והיה קשוב להודעות על גבי האפליקציה.

אם נורית החיווי הכתומה עדיין ממשיכה לדלוק, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות.

## סוללת המשדר החכם וטעינה

**ש: כמה זמן תעבוד סוללת משדר חכם טעונה לגמרי?**

**ת:** סוללת משדר חכם טעונה לגמרי תעבוד בדרך כלל בערך 24 עד 36 שעות.

**ש: מהו אורך הטעינה של סוללת המשדר החכם?**

**ת:** לוקח כ-15 דקות להטעין משדר חכם כאשר הוא מחובר אל שקע קיר. הטעינה עלולה לקחת זמן רב יותר אם היא מתבצעת דרך יציאת USB במחשב או כאשר מתח הסוללה ריק לגמרי.

**ש: מה קורה אם מתח סוללת המשדר החכם ריק לגמרי?**

**ת:** לא תוצגנה קריאות סוכר. החלף תמיד באופן מידי את סוללת המשדר החכם כאשר היא התרוקנה לחלוטין.

**ש: כיצד אוכל לבדוק את מצב סוללת המשדר החכם?**

**ת:** יישן שלוש דרכים לבדוק את מצב הסוללה:

1. לחץ על **Menu > About > My**

**Transmitter (תפריט < אודות < המשדר שלי).** גלול מטה אל קו רמת הסוללה שמציין את כמות מתח הסוללה שנותרה.

2. בדוק את סמל הסוללה בפניה הימנית

העליונה של מסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי). סמל סוללה אדום מראה שסוללת המשדר החכם ריקה.

3. הפעל את המשדר החכם. לחץ ושחרר את

לחצן ההפעלה של המשדר החכם. נורית חיווי כתומה על גבי המשדר החכם מציינת מתח סוללה נמוך. נורית חיווי ירוקה מציינת שמתח הסוללה טעון ב-10% לפחות.

**ש: בדף About > My Transmitter (אודות < המשדר שלי), רמת הסוללה מוצגת כ-65% ולאחר מכן צונחת ל-35%. מדוע?**

**ת:** קצב פריקת הסוללה משתנה במידה רבה בהתאם לשימוש; פריקת הסוללה של אותו דגם סוללה בשני מכשירים שונים לא תתבצע באותו קצב. לכן אנו מציגים את חיווי טעינת הסוללה במסך זה במרווחים גדולים: 100%, 65%, 35%, 10% ו-0%. הבדיקות שלנו מראות שהתרעת "Low Battery" (סוללה חלשה) מתחילה בעקביות בנקודה בה למשדר החכם עדיין יישן בערך שעתיים של הפעלה שנותרו (בערך 10% מרמת המתח בסוללה). חשוב להטעין את סוללת המשדר החכם כאשר מתקבלת התרעת "Low Battery" (סוללה חלשה).

## החיבור עם המשדר החכם

**ש:** איך אני מחבר את המכשיר הנייד שלי אל המשדר החכם בפעם הראשונה?

- ת:** עקוב אחר השלבים למטה על מנת לחבר את המכשיר הנייד שלך אל המשדר החכם. אנא קרא את המדריך למשתמש למידע מפורט יותר.
1. הפעל את אפליקציית Eversense.
  2. לחץ על לחצן ההפעלה של המשדר החכם שלוש פעמים על מנת לעבור למצב "ניתן לאיתור".
  3. כאשר המשדר החכם מהבהב בצבעים ירוק וכתום, לחץ על מספר הזיהוי של המשדר החכם על גבי מסך **CONNECT (חיבור)**. האפליקציה תתחיל את תהליך החיפוש.
  - מספר הזיהוי של המשדר החכם שלך זהה למספר הסידורי הרשום על גבי החלק האחורי של המשדר החכם שלך.
  4. כאשר האפליקציה מוצאת את המשדר החכם שלך, מסך קופץ **BLUETOOTH PAIRING REQUEST (בקשה לשיון BLUETOOTH)** מופיע.
  5. לחץ על **Pair (קישור)** על מנת לאשר את החיבור.
  6. האפליקציה תציג את המילה **Connected (מחובר)** ליד מספר הזיהוי של המשדר החכם לאחר שהחיבור יושלם.

**ש:** נראה שאין חיבור בין המשדר החכם והמכשיר הנייד.

**ת:** יכולות להיות כמה סיבות בגללן אין לך חיבור.

- וודא שפונקציית ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלך מופעלת ושם או המספר הסידורי של המשדר החכם מופיע ברשימת ההתקנים.
  - המצב יכול להיות זמני בלבד. לחץ על **Menu Connect > (תפריט < חיבור)**. אם ליד שם המשדר החכם שלך מופיעה המילה **Disconnected (מנותק)**, לחץ על שם המשדר החכם על מנת לבצע חיבור ידני.
  - המשדר החכם שלך עלול לא להימצא בטווח הפעולה של המכשיר הנייד שלך. הזז את המכשיר הנייד שלך קרוב יותר אל המשדר החכם.
  - המשדר החכם שלך עלול להיות כבוי, ללא מתח בסוללה או כרגע במצב טעינה. יכול להיות שיהיה צורך לאתחל את פונקציית ה-Bluetooth (BLE) על גבי המשדר החכם על ידי מעקב אחר השלבים הבאים.
1. כבה את המשדר החכם – לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 5 שניות והמתן לרטט אשר יאשר שהוא כבוי.
  2. המתן שתי שניות ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה שלוש פעמים על מנת לאתחל את פונקציית ה-Bluetooth (BLE). **(הערה: בעת ביצוע אתחול של פונקציית ה-Bluetooth, אל תסיר/תשכח את ההתקן המחובר דרך הגדרות ה-Bluetooth של המכשיר הנייד שלך.)**

3. לחץ על לחצן ההפעלה שוב שלוש פעמים על מנת להעביר את המשדר החכם למצב 'ניתן לאיתור' ולחבר בינו ובין המכשיר הנייד שלך. לחץ על **Connect > Menu (תפריט < חיבור)** על מנת לראות אם המשדר החכם שלך מחובר. אם הוא איננו מחובר, לחץ על 'בחר משדר חכם' מתוך הרשימה. אם שלבים אלו אינם פותרים את הבעיה, ייתכן שיהיה עליך לגשת להגדרות ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלך ולהסיר או לשכוח את המשדר החכם ולאחר מכן ללחוץ על לחצן ההפעלה של המשדר החכם 3 פעמים על מנת לחבר ביניהם מחדש. אם הבעיה ממשיכה, ייתכן ויהיה עליך לאפס את המשדר החכם שלך.

### ש: איך אני מאפס את המשדר החכם שלי?

ת: עקוב אחר השלבים למטה.

1. הנח את המשדר החכם בעריסת הטעינה וחבר את כבל ה-USB. חבר את הכבל לשקע קיר. (אתה יכול גם לחבר את הקצה הסטנדרטי של כבל ה-USB אל תוך יציאת ה-USB על גבי המחשב שלך.)
2. לחץ והחזק את לחצן ההפעלה (למשך כ- 14 שניות) במשדר החכם בעודו מחובר אל כבל ה-USB. שחרר את לחצן ההפעלה.

3. נורית החיווי תתחיל להבהב בתוך כשתי שניות כדי לציין שהמשדר החכם עובר רצף בדיקות עצמיות. נורית החיווי מהבהבת במגוון צבעים. לאחר שהבדיקה העצמית הושלמה, המשדר החכם ירטוט ונורית החיווי בצבע ירוק או כתום תישאר דלוקה.

4. אם הבדיקה העצמית לא הושלמה, חזור על שלבים 1 עד 3.

5. אם סיימת בהצלחה את שלב מספר 3, המשדר החכם מוכן לפעולה.

6. נתק את המשדר החכם מכבל ה-USB והמשך לתהליך החיבור. לאחר השיוך, המערכת תעבור לשלב האתחול. אם איך מסוגל להשלים את האתחול, צור קשר עם שירות לקוחות.

### ש: האם אנשים אחרים יכולים להתחבר אל המשדר החכם שלי?

ת: מערכת Eversense E3 CGM עושה שימוש בחיבור Bluetooth בטוח והיא לא תאפשר לאחרים להתחבר.

### ש: מה קורה אם המשדר החכם שלי מתנתק מן המכשיר הנייד שלי או מן האפליקציה?

ת: המשדר החכם ירטוט והאפליקציה תספק הודעה של "משדר מנותק" כל 5 עד 30 דקות על בסיס הגדרות הצליל שלך, עד אשר פותחים את האפליקציה או המשדר החכם מתחבר שוב. לאחר שהחיבור מחדש נקבע, הנתונים שנאספו יסונכרו עם האפליקציה למכשירים ניידים.

**ש: מדוע אינני יכול לחבר את המכשיר הנייד שלי למשדר החכם שלי (ההודעה No Transmitter Connected (אין משדר מחובר) מוצגת בשורת המצב של האפליקציה)?**

- ת: ייתכן שהחיבור בין המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלך ייכשל מכל אחת מן הסיבות הבאות:
- המשדר החכם נמצא כעת בטעינה.
  - המשדר החכם כבוי.
  - אין מתח בסוללת המשדר החכם.
  - ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלך כבוי.
  - לא נקבע חיבור בין המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלך או שהחיבור הקיים "נותק". אתה צריך לבצע חיבור מחדש.

**ש: למה אני רואה Searching (חיפוש) על גבי מסך CONNECT (חיבור)?**

- ת: האפליקציה תמשיך להראות את המסך Searching (חיפוש) בגלל כל אחת מן הסיבות הבאות:
- המשדר החכם נמצא כעת בטעינה.
  - המשדר החכם כבוי.
  - אין מתח בסוללת המשדר החכם.
  - ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלך כבוי.
  - לא נקבע חיבור בין המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלך או שהחיבור הקיים "נותק". אתה צריך לבצע חיבור מחדש.

**ש: מהו מצב "ניתן לאיתור" (קישור)?**

ת: מצב 'ניתן לאיתור' הוא מצב המאפשר למשדר החכם להיות מאותר על ידי המכשיר הנייד שלך על מנת לבצע חיבור. ראה מתחילים למידע נוסף.

**ש: המשדר החכם שלי איננו מופיע על גבי מסך CONNECT (חיבור)?**

- ת: המשדר החכם לא יופיע במסך CONNECT (חיבור) בגלל כל אחת מן הסיבות הבאות:
- מתבצעת כעת טעינה של המשדר החכם דרך ה-USB.
  - המשדר החכם כבוי.
  - אין מתח בסוללת המשדר החכם.
  - ה-Bluetooth על גבי המכשיר הנייד שלך כבוי.
  - לא נקבע חיבור בין המשדר החכם אל המכשיר הנייד שלך או שהחיבור הקיים "נותק". אתה צריך לבצע חיבור מחדש.

**ש: מדוע אני רואה משדרים חכמים אחרים המופיעים על גבי מסך CONNECT (חיבור)?**

ת: אם משתמשים אחרים במערכת Eversense E3 CGM נמצאים קרוב אליך, ייתכן והאפליקציה תמצא את המשתמשים הללו. יחד עם זאת, האפליקציה תתחבר רק אל המשדר החכם אשר חובר עם המכשיר הנייד שלך. אל תנסה לחבר את המכשיר הנייד שלך למשדרים חכמים אחרים שאינם שלך.

## כיול

**ש: מהי השעה שאני צריך להזין במסך CALIBRATE (כיול) כאשר אני מקבל הודעה שעלי לכייל?**

ת: הזן את השעה בה ביצעת בדיקת סוכר בדם בעזרת מד הסוכר שלך. עליך להזין את תוצאות בדיקת הסוכר בדם במהלך 10 דקות לאחר הביצוע שלה.

**ש: למה הכיול שלי לא התקבל?**

ת: המערכת לא תקבל את הכיול שלך בגלל אחת מן הסיבות הבאות:

- קריאת הסוכר בדם שהזנת נמוכה מ-40 מ"ג/ד"ל.

- קריאת הסוכר בדם שהזנת גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.

אם יש צורך בכיול נוסף, המערכת תבקש ממך לעשות זאת.

**ש: קיבלתי משדר חכם חדש. איך אני מנתק את המשדר החכם הישן ומחבר את המשדר החדש אל המערכת שלי?**

ת: בתוך התפריט הראשי, לחץ על **Connect** (**חיבור**). לחץ והחזק את השם של המשדר הישן שלך. לחץ על **OK** (**אישור**) על מנת לעצור את האפליקציה מחיבור אוטומטי אל המשדר החכם הישן. שכח את המשדר הישן שלך מתוך הגדרות ה-Bluetooth של הטלפון שלך. עקוב אחר השלבים **במדריך זה למשתמש** על מנת לחבר בין המשדר החכם החדש והאפליקציה ולקשרו אל החיישן שלך.

## ש: מדוע אינני יכול לבצע כיול?

ת: ייתכן ולא תהיה מסוגל לבצע כיול בגלל אחת מן הסיבות הבאות:

- לא נאספו מספיק נתוני סוכר מן החיישן, דבר העלול לקחת כ-5 דקות.
- ערכי הסוכר המגיעים מן החיישן משתנים במהירות, לדוגמה לאחר אוכל או אינסולין.
- קריאת הסוכר בדם מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל.
- קריאת הסוכר בדם גבוהה מ-400 מ"ג/ד"ל.
- קריאת הסוכר בדם נלקחה יותר מ-10 דקות לפני הזנתה באפליקציית ה-Eversense.
- שיעור קריאת הסוכר האחרונה מן החיישן שונה באופן משמעותי מקריאת הסוכר בדם שהוזנה.
- מתבצע כיול.
- עברה פחות משעה מן הכיול המוצלח האחרון.
- המשדר שלך מנותק.
- המשדר איננו מחובר אל החיישן שלך.
- יש צורך להחליף את החיישן שלך.

ש: היכן אני יכול למצוא מידע על שלב הכיול, מספר הכיולים שהתבצעו והתאריך והשעה של הכיול האחרון?

ת: אתה יכול לראות פרטי כיול על ידי לחיצה על **Menu > About > My Transmitter** (תפריט < אודות < המשדר שלי).

## ש: מהם הסוגים השונים של שלבי הכיול?

ת: למערכת ה-Eversense E3 CGM יש שלושה סוגים של שלבי כיול: שלב האתחול, שלב 2 כיולים יומיים ושלב כיול יומי אחד. שלב האתחול מתחיל 24 שעות לאחר החדרת החיישן ודורש 4 בדיקות דם מהאצבע של סוכר בדם לכיול. המערכת תודיע לך אם יש צורך בכיול אחד או ב-2 כיולים בכל יום.

## התרעות והודעות

**ש: האם אני יכול לשנות את תבנית התרעת הרטט על גבי המשדר החכם שלי?**

ת: תבניות הרטט של המשדר החכם קבועות ולא ניתן לשנות אותן. עבור התרעות מסוימות ניתן לשנות את מרווח החזרה על ההתרעה ב- **Settings** > **Sound Settings** (הגדרות < הגדרות צליל).

## ש: מהו ההבדל בין התרעה להודעה?

ת: ההודעה היא מסר שאיננו קריטי, בעל עדיפות נמוכה (לדוגמה, תזכורת כיוול).

התרעה היא מסר חשוב המצריך את תשומת הלב שלך וייתכן שיהיה צורך בתגובתך/נקיטת פעולות מסוימות.

## ש: מהן התרעות חיזוי?

ת: התרעות חיזוי מודיעות לך מראש על אירוע אשר עלול להתרחש אם המגמות הנוכחיות ממשיכות. התרעות החיזוי עושות שימוש ברמות ההתרעות לרמות סוכר גבוהות ונמוכות אשר הגדרת על מנת לקבוע את זמן ההתרחשות של התרעת החיזוי. אתה יכול להגדיר את ההתרעות כל שהן תודענה לך 10, 20 או 30 דקות מראש כאשר מערכת ה-CGM תחזה שאתה תגיע לרמות ההתרעה אותן קבעת. המשדר החכם שלך ירטוט והאפליקציה שלך תשמיע צליל ועל גבי מסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי) יופיע מסר אשר יודיע לך על רמה חזויה של סוכר נמוך או גבוה. אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, או למה שההתרעה מציינת, תמיד יש לבצע בדיקת סוכר בדם בעזרת דגימת דם מהאצבע לפני כל החלטה בנוגע לטיפול.

**ש: האם אני יכול להגדיל את עצמת הקול עבור התרעות האפליקציה המגיעות מן המכשיר הנייד שלי?**

ת: אתה יכול להגדיל את עצמת הקול עבור התרעות האפליקציה על ידי חיבור של המכשיר הנייד שלך אל התקן חיזוי על מנת להגביר את הצליל.

**ש: האם אני יכול לשנות את מספר ההתרעות אותן אני מקבל?**

ת: אם אתה מרגיש שאתה מקבל יותר מדי התרעות, עליך לשוחח תחילה על הגדרות ההתרעה המתאימות ביותר עבורך עם הצוות הרפואי שלך. אם אתה צריך לשנות את הגדרות הסוכר שלך, לחץ על **Settings > Menu** > **Glucose** (תפריט < הגדרות < סוכר).

## ש: מהן התרעות קצב השינוי?

ת: התרעות קצב השינוי מודיעות לך כאשר רמות הסוכר שלך נופלות או עולות מהר יותר מן ההגדרות אותן הזנת ב- **Settings** > **Glucose** (הגדרות < סוכר).

**ש: מהן התרעות קצב השינוי?**

ת: התרעות קצב השינוי מודיעות לך כאשר רמות הסוכר שלך נופלות או עולות מהר יותר מן ההגדרות אותן הזנת ב-**Settings** **Glucose** (הגדרות < סוכר).

**ש: מדוע אינני יכול לראות הודעות כאשר האפליקציה נמצאת ברקע?**

ת: עיין בהוראות עבור המכשיר הנייד שלך על מנת לאפשר את ההודעות מן הרקע.

**ש: מה קורה להודעות אם האפליקציה שלי מתנתקת מן המשדר החכם שלי?**

ת: אם האפליקציה מתנתקת מן המשדר החכם שלך, אך אתה נושא את המשדר החכם מעל החיישן, ההתרעות שהתקבלו במהלך זמן זה יישלחו לאפליקציה ברגע שהיא תחובר מחדש ותסונכרן עם המשדר החכם.

**ש: איך אני יכול למיין את ההודעות ממסך ALERT HISTORY (היסטוריית התרעות)?**

ת: למסך **ALERT HISTORY** (היסטוריית התרעות) ישנו מסנן למיין בחלקו העליון. אתה יכול לבצע מיין בהתאם לדרגת החומרה (צהוב וכחול) ולסוג ההתרעה. לחץ על סמל מסנן המיין הרצוי.

**ש: איך אני משתיק התרעות סוכר?**

ת: ניתן להשתיק התרעות סוכר על ידי אישור ההתרעה על גבי המכשיר הנייד שלך ונטילת הפעולות המתאימות אם יש צורך בכך.

## קריאות סוכר

### ש. מדוע קריאות הסוכר המגיעות מן החיישן שונות מקריאות הסוכר בדם שלי?

ת: מערכת Eversense E3 CGM מודדת סוכר בנוזל בין-תאי (ISF) הנמצא בין תאי הגוף. ההבדלים הפיזיולוגיים בין הנוזל הבין-תאי לבין הדם בדגימת דם עשויים לגרום להבדלים במדידות של רמת הסוכר בדם. הבדלים אלה ניכרים במיוחד כאשר מתבצעים שינויים מהירים ברמת הסוכר בדם (כגון לאחר אכילה, קבלת מנת אינסולין או פעילות גופנית), ואצל חלק מהאנשים, במהלך הימים הראשונים לאחר ההחדרה עקב זיהום העלול להיגרם כתוצאה מהליך ההחדרה. בממוצע, חולפות מספר דקות עד שרמת הסוכר בדם מגיעה לרמת הסוכר בנוזל הבין-תאי. עד שלא תבין מהם ההבדלים הללו, אשר את קריאות החיישן עם בדיקת סוכר בדם מהאצבע. כמו כן, אם התסמינים שלך אינם מתאימים לערך הסוכר בחיישן, עליך לבצע מיד בדיקת סוכר בדם מהאצבע.

### ש: אני מקבל "-- --" קריאות סוכר מן החיישן על גבי האפליקציה.

ת: ייתכן ולא תקבל קריאות סוכר מן החיישן כאשר אין חיבור בין המשדר החכם שלך והחיישן שלך או בין המשדר החכם שלך והמכשיר הנייד שלך.

ייתכן ולא תקבל קריאות סוכר כאשר אחת מן ההתרעות למטה מופעלת:

- No sensor detected (לא זוהה חיישן).
  - קריאת Out of Range High Glucose (סוכר גבוה מחוץ לטווח) או Out of Range Low Glucose (סוכר נמוך מחוץ לטווח) של החיישן.
  - Low Sensor Temperature (טמפרטורת חיישן נמוכה).
  - High Ambient Light (תאורת סביבה חזקה).
  - Sensor Check (בדיקת חיישן).
  - High Smart Transmitter Temperature (טמפרטורה גבוהה של המשדר החכם).
  - High Sensor Temperature (טמפרטורת חיישן גבוהה).
  - Empty Battery (סוללה ריקה).
  - Calibration Past Due (איחור בכיול).
  - New Sensor Detected (זוהה חיישן חדש).
  - Sensor Replacement (החלפת חיישן).
  - Calibration Expired (פג תוקף הכיול).
  - Smart Transmitter Error (שגיאת משדר חכם).
  - Transmitter Replacement Alert (התרעת החלפת משדר)
  - Sensor Suspend Alert (התרעת השעיית חיישן).
- אנא עקוב אחר ההוראות אשר סופקו במסר ההודעה על מנת לפתור את ההתרעה.

## קבלה של החלטות טיפול

**ש: איזה מידע יש לקחת בחשבון לפני ביצוע של החלטת טיפול?**

ת: לפני כל החלטת טיפול, עליך לקחת בחשבון את ערך הסוכר המגיע מן החיישן, את גרף המגמה, את חץ המגמה וכל התרעה המגיעה ממערכת ה-Eversense E3 CGM. אם חץ המגמה איננו מוצג, למערכת אין מספיק נתונים על מנת להציג את כיוון ושיעור השינוי. אתה לא יכול לקחת החלטות טיפול המתבססות רק על ערך הסוכר בחיישן.

**ש: למה ערך הסוכר שלי אפור?**

ת: כאשר למערכת אין מספיק נתונים על מנת לספק חץ מגמה, ערך הסוכר בחיישן עלול להיות מוצג בצבע אפור. אתה לא יכול לקחת החלטות טיפול המתבססות רק על ערך הסוכר בחיישן.

**ש: מתי עלי לבצע בדיקת דם מהאצבע על מנת לבדוק את רמת הסוכר בדם שלי?**

ת: עליך לבצע בדיקת סוכר בדם:

- כאשר הגיע הזמן לכיול.
- לא מוצג ערך סוכר.
- לא מוצג חץ מגמה.
- התסמינים שלך לא מתאימים למידע הסוכר המוצג.
- ערך הסוכר בחיישן הנוכחי מוצג בצבע אפור.
- שורת המצב מוצגת בצבע כתום.
- אתה נוטל תרופות מסוג טטראציקלין.

## חצי מגמה

**ש: חצי המגמה שלי והתרעות הסוכר לא מתאימות.**

ת: חצי המגמה מורים על השיעור והכיוון של שינויי רמות הסוכר. לדוגמה, ייתכן ויהיה לך חץ מגמה הפונה כלפי מעלה או כלפי מטה (המראה שינויים מהירים או אטיים). התרעות הסוכר מודיעות לך כאשר רמת הסוכר הנוכחית שלך מגיעה לרמת ההתרעה אותה הגדרת, ללא קשר לשיעור או כיוון השינוי.

**ש: חץ המגמה שלי חסר.**

ת: מערכת ה-CGM עושה שימוש ב-20 הדקות האחרונות של נתוני סוכר רציפים לחישוב והצגה של חצי המגמה. כאשר אין מספיק ערכי חיישן זמינים לחישוב, החץ לא יוצג. אין לבצע החלטות טיפול אלא אם כן אתה רואה ערך סוכר, חץ מגמה ואתה לוקח בחשבון את ההתרעות והמגמות האחרונות.

## האפליקציה

**ש: מה יקרה אם אני מתקין מחדש את האפליקציה?**

ת: כאשר אתה מתקין מחדש את האפליקציה, האפליקציה תוריד נתונים היסטוריים מ-3 הימים האחרונים בלבד.

**ש: מהי גרסת האפליקציה המותקנת במכשיר הנייד שלי?**

ת: אתה יכול למצוא את גרסת תכנת האפליקציה על ידי לחיצה על **Menu > About > Product Information** (תפריט < אודות < מידע על המוצר).

**ש: איך יתבצע עדכון של האפליקציה שלי?**

ת: עקוב אחר ההליך ושמור את האפליקציה שלך מעודכנת באמצעות Apple App Store או Google Play Store.

**ש: מהם המכשירים התואמים לאפליקציית Eversense?**

ת: בקר באתר <https://global.eversensedidiabetes.com/compatibility> עבור רשימה של מכשירים תואמים.

**ש: האם אני עדיין יכול להשתמש במשדר החכם אם אני מחליף את המכשיר הנייד שלי למכשיר חדש?**

ת: יהיה עליך להתקין את האפליקציה על גבי המכשיר הנייד החדש שלך ולחבר אותה עם המשדר החכם שלך. 3 הימים האחרונים של נתונים היסטוריים יסונכרו עם האפליקציה על גבי המכשיר הנייד החדש שלך.

## ש: האם אני יכול למחוק את חשבון Eversense שלי?

ת: מחיקת החשבון היא קבועה, ואז לא תהיה לך עוד גישה אל נתוני CGM באפליקציה למובייל Eversense Mobile או אל חשבון Eversense DMS שלך. אם אתה משתמש באפליקציה למובייל Eversense NOW, לא תוכל עוד להציג מרחוק את נתוני Eversense CGM. לא ניתן להשתמש באותה כתובת דוא"ל כדי ליצור חשבון חדש. כדי למחוק את החשבון, יש להקיש על **Delete Account (מחק חשבון)** בעמוד הכניסה אל המערכת.

## ש: מהי אופציית 'נא לא להפריע'?

ת: כאשר פונקציית 'נא לא להפריע' מוגדרת בהגדרות אפליקציית Eversense, המשדר תפסיק להציג הודעות שאינן קריטיות. החכם יפסיק לספק התרעות רטט עבור התרעות שאינן קריטיות. התרעות קריטיות תמשכנה להתקבל באמצעות המשדר החכם והאפליקציה במכשיר הנייד.

שים לב שהתכונה נא לא להפריע בטלפון החכם שלך גוברת על האפשרות המקבילה באפליקציה. כך שאם התכונה 'נא לא להפריע' מופעלת בטלפון החכם שלך, אתה לא תקבל את ההתרעות על גבי המשדר החכם או באפליקציה. יחד עם זאת, עם מערכת הפעלה מסוימות עבור טלפונים אתה יכול לאפשר התרעות סוכר נמוך כך שיעברו מעל להגדרות הקול של הטלפון שלך. ראה הגדרות צליל למידע נוסף. היה מודע לעובדה שישנן אפליקציות אשר תפעלנה באופן אוטומטי את תכונת 'נא לא להפריע' בטלפון שלך.

## ש: מדוע שורת המצב שלי מודיע "syncing" (מסנכרן)?

ת: "Syncing" יופיע בשורת הסטטוס כאשר האפליקציה על גבי המכשיר הנייד שלך מתחברת אל המשדר החכם שלך.

## ש: הגדרות הסוכר שלי והגדרות הפרופיל הזמני שלי אפורות ואיני יכול להתאים אותן.

ת: אתה צריך לקשר את האפליקציה שלך אל המשדר החכם שלך על מנת להיות מסוגל להתאים את הגדרות הסוכר והגדרות הפרופיל הזמני שלך.

## ש: האם אני יכול לערוך הזנה ידנית של אירוע של סוכר בדם?

ת: הזנות ידניות של אירועי סוכר בדם והזנות כיוול לא ניתנות לעריכה.

## ש: אם אני מחביא אירוע, האם אוכל לשחזר אותו מאוחר יותר?

ת: לא ניתן לשחזר אירועים אשר הוחבאו.

## ש: אלו טווחי חזרה אני יכול להגדיר עבור סוכר גבוה ונמוך?

ת: עבור סוכר גבוה, טווח החזרה יכול להיות 15 עד 180 דקות, בטווחים של 15 דקות כל אחד. עבור סוכר נמוך, טווח החזרה יכול להיות 5 עד 30 דקות, בטווחים של 5 דקות כל אחד.

## חיישן

**ש: האם ניתן להחדיר את החיישן במקום אחר מאשר החלק העליון של הזרוע שלי?**

ת: מערכת ה-Eversense E3 CGM נוסתה במחקרים קליניים רק בחלק הזרוע העליון ואין להחדיר את החיישן בכל מקום אחר.

**ש: מתי אני צריך להחליף את החיישן שלי?**

ת: החיישן שלך יפעל עד 180 ימים. אתה תקבל הודעות תקופתיות (60, 30, 14, 7, 3, ויום אחד לפני) בכדי להזכיר לך מתי יש צורך להחליף את החיישן. צור קשר עם הצוות הרפואי שלך על מנת לקבוע החלפת חיישן.

**ש: האם אני יכול להאריך את חיי החיישן?**

ת: החיישן לא יספק יותר קריאות סוכר לאחר שפג תוקפו של זמן הנשיאה שלו.

**ש: היכן אני יכול למצוא את המספר הסידורי של החיישן שלי?**

ת: אתה יכול לראות את המספר הסידורי של החיישן שלך על ידי לחיצה על **Menu > About > My Sensor** (תפריט < אודות < החיישן שלי).

**ש: קישרתי עתה בין חיישן ומשדר חכם בפעם הראשונה, אך אינני יכול לראות את תאריך ואו שעת ההחדרה כאשר אני לוחץ על **About > My Sensor** (אודות < החיישן שלי).**

ת: ייתכן ותעבורנה 10 דקות להשלים את תהליך

הקישור. וודא שהמשדר החכם נמצא מעל

לחיישן. אשר שמסך **LINKED SENSOR**

(חיישן מקושר) מציג סימן ביקורת לצד **Linking**

**Process Complete** (תהליך הקישור הושלם).

נווט אל מסך **MY GLUCOSE** (הסוכר שלי)

והמתן כ-2 דקות. חזור אל מסך **MY SENSOR**

(החיישן שלי).

אם תאריך ושעת ההחדרה הנכונים עדיין לא

מוצגים, עקוב אחר הצעדים הבאים:

1. הסר את המשדר החכם ממקום ההחדרה.

חבר אותו אל כבל הטעינה ואל מקור

המתח. חבר את מקור המתח אל שקע

קיר ולאחר מכן הוצא אותו ונתק אותו

מכבל הטעינה.

2. הנח מחדש את המשדר החכם מעל

לחיישן. נווט אל **About > My Sensor**

(אודות < החיישן שלי) ואשר את התאריך

והשעה הנכונים של ההחדרה. אם הבעיה

ממשיכה, צור קשר עם שירות הלקוחות.

## ש: מדוע אני רואה הודעת "New Sensor Detected" (זוהו חיישן חדש)?

ת: מסר זה מופיע כאשר המשדר החכם שלך מאתר חיישן חדש ואתה יכול לבצע קישור בין המשדר החכם והחיישן. ניתן לקשר את המשדר החכם לחיישן אחד בלבד בכל פעם. אם אתה רואה מסר **New Sensor Detected (זוהו חיישן חדש)** וכבר יש לך חיישן מוחדר ומקושר אל המשדר החכם שלך, לחץ על **Not Now (לא עכשיו)**. אם אינך בטוח, צור קשר עם שירות הלקוחות למידע נוסף.

## ש: מדוע מערכת ה-CGM שלי נכנסה שוב אל שלב האתחול?

- ת: אתה תיכנס שוב אל שלב האתחול בגלל אחת מן הסיבות הבאות:
- פג תוקפה של תקופת הכיול בלי שהזנת ערך בדיקה באמצעות דגימת דם מהאצבע.
  - 3 קריאות סוכר בדם או יותר שונות באופן משמעותי מקריאות הסוכר הנוכחיות של החיישן.
  - המשדר החכם שלך לא נטען בטווח של 16 שעות מהופעת ההתרעה על סוללה ריקה.
  - אם אתה משנה באופן ידני את השעה על גבי המכשיר הנייד שלך, המשדר החכם שלך יבצע סנכרון ויתבצע אתחול עם המכשיר הנייד שלך.

- משדר חדש קושר אל החיישן הקיים שלך. לדוגמה, אם החלפת את המשדר הקיים שלך.
- אם התבקשת על ידי שירות הלקוחות לקשר מחדש את החיישן שלך.

## ש: האם זה בסדר שטכנאי MRI יישא את מערכת Eversense E3 CGM?

ת: כן, זה בסדר שטכנאי MRI יישא את מערכת Eversense E3 CGM. יחד עם זאת, עבור אנשים העוברים בדיקת MRI עם שדה מגנטי סטטי של 1.5 טסלה או 3.0 טסלה, החיישן יכול להישאר במקומו מתחת לעור, אך את המשדר החכם יש להסיר ולהשאיר מחוץ לחדר. ראה *מידע בטיחות בנוגע ל-MRI* למידע נוסף.

ש: איך אני יכול למיין את האירועים שלי על גבי מסך EVENT LOG (יומן אירועים)?

ת: מסך EVENT LOG (יומן אירועים) כולל מסנן למיין בחלק העליון של המסך. לחץ על סמל מסנן המיין הרצוי כדי לכלול ולא לכלול אירועים ברשימה. אפשרות המיין המוגדרת כברירת מחדל היא הצגת כל האירועים.

ש: מדוע לפעמים אני רואה סרגל התקדמות כחול ולבן לרוחב החלק העליון של המסך שלי?

ת: אתה תראה את סרגל ההתקדמות הנ"ל לסנכרון מכמה סיבות:

- המשדר החכם שלך לא נמצא בטווח החיישן שלך לתקופה מסוימת והוא מבצע סנכרון מחדש.
- סגרת לגמרי את אפליקציית Eversense ולאחר מכן פתחת אותה שוב.
- סוללת המכשיר הנייד שלך התרוקנה והוא נטען מחדש.

## קיצורי דרך

**ש: האם יש דרך לבחור תאריך מסוים להצגה על מסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי), במקום לגלול לאחור?**

**ת: כן, לחץ על סרגל "היום" מעל לגרף. יופיע חלון קופץ על מנת שתוכל לבחור את התאריך הרצוי אשר יוצג על הגרף.**

**ש: אם אני צופה בתאריך/שעה בעבר במסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי), האם יש קיצור דרך לחזרה לתאריך והשעה הנוכחיים?**

**ת: כן, לחץ על ערך הסוכר/חץ המגמה על מנת לחזור לתאריך/שעה הנוכחיים על גבי מסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי).**

**ש: האם יש קיצור דרך אל מסך ALERT HISTORY (היסטוריית התרעות)?**

**ת: אם המשדר החכם שלך מחובר אל האפליקציה, אתה יכול ללחוץ על שורת המצב בחלק העליון של העמוד על מנת להציג את מסך ALERT HISTORY (היסטוריית התרעות).**

**ש: האם יש קיצור דרך אל מסך CONNECT (חיבור)?**

**ת: אם המשדר החכם שלך איננו מחובר אל האפליקציה, אתה יכול ללחוץ על שורת המצב בחלק העליון של העמוד על מנת להציג את מסך CONNECT (חיבור).**

**ש: האם יש קיצור דרך על מנת להזין אירוע מסוים, כגון ארוחות או פעילות גופנית?**

**ת: ממסך MY GLUCOSE (הסוכר שלי), לחץ על הגרף על מנת להציג את מסך EVENT ENTRY (הכנסת אירוע).**

# 19. ביצוע ההתקן

חלק זה מציג את מאפייני ביצוע ההתקן.

## ביצוע מחקר קליני

הבטיחות והיעילות של מערכת ה-Eversense E3 CGM הוערכו במחקר הקליני PROMISE אשר התנהל בארה"ב. הנתונים הכלולים בחלק זה של *ביצוע ההתקן* מתבססים על הנתונים אשר נאספו במהלך מחקר PROMISE עם אלגוריתם חדש (SW604) ושינוי קל בעיצוב החיישן (חיישן E3). הערכות דיוק בוצעו בנקודות מגוונות במהלך המחקר והמשתתפים התבקשו לדווח על כל תופעת לוואי במהלך המחקרים. חלק הבטיחות משקף את כל משתתפי המחקר (n=181).

### מחקר PROMISE

מחקר PROMISE היה מחקר קליני רב אתרי, צפוי, לא אקראי ורב חשיבות. מאה שמונים ואחד (181) מבוגרים (בגיל 18 ומעלה) הסובלים מסוכרת מסוג 1 או מסוג 2 השתתפו במחקר ב-8 אתרים ברחבי ארה"ב. לתשעים ושישה (96) משתתפים הוחדרו שני חיישנים, אחד בכל זרוע. ארבעים ושלושה (43) מן החיישנים המשניים היו חיישני SBA. המשתתפים ביצעו אינטראקציה עם המערכת בכדי לכייל ולהתייחס להודעות שאינן קשורות לנתוני הסוכר. כל ההחלטות הקשורות לטיפול בסוכרת התבססו על ערכי סוכר בדם ועל הטיפול הקליני הסטנדרטי. הדיוק נמדד במהלך ביקורי מרפאה שארכו יום שלם כל אחד. ביקורים אלו התרחשו בימים 1, 7, 14, 22, 30, 60, 90, 120, 150, ו-180. בכל ביקור, דיוק החיישן הוערך ביחס למנתח מעבדה סטנדרטי הידוע כ-YSI. נערכה השוואה בין קריאות הסוכר באותו הזמן בין מנתח הייחוס והמכשיר הרציף. ביקור מעקב התרחש עשרה ימים לאחר הסרת החיישן.

טבלה 1 – דיוק אל YSI ב-PROMISE\*

MARD	אחוז של קריאות מערכת CGM בתוך				מספר כולל של ערכי YSI ו-CGM מחוברים
	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס	
8.5%	99.6	98.6	93.9	87.3	12,034

\*ערכי סוכר בין 40 ו-400 מ"ג/ד"ל.

## דיוק Eversense E3 אל YSI במחקר PROMISE

הדיוק נמדד על ידי השוואה של ערכי הסוכר בחיישן E3 Eversense אל ערכי סוכר בדם YSI. עבור ערכי סוכר בדם הנמוכים או השווים אל 80 מ"ג/ד"ל, חושב ההבדל המוחלט הממוצע בין שתי התוצאות. עבור ערכים הגדולים מ-80 מ"ג/ד"ל, חושב ההבדל היחסי המוחלט הממוצע.

### טבלה 2 – דיוק אל YSI במחקר \*PROMISE

הבדל יחסי מוחלט ממוצע	מספר קריאות מספר קריאות CGM-YSI מחוברות	טווח סוכר YSI (מ"ג/ד"ל)
8.5	12,034	סך הכל
--	0	*40 >
7.5	592	*60 - 40
7.7	1,221	*80 - 61
8.6	5,067	180 - 81
7.4	3,300	300 - 181
6.9	1,457	350 - 301
6.4	375	400 - 351
9.5	25	400 <

\*עבור YSI  $\geq 80$  מ"ג/ד"ל, ההבדלים במ"ג/ד"ל כלולים במקום הבדל אחוזים (%).

הביצוע גם נמדד על ידי חישוב אחוזי קריאות הסוכר בחייושן בתוך 15 מ"ג/ד"ל או 15% של ייחוס ה-YSI. טבלאות אלו מראות את הסכמת האחוזים במספר רמות, בטווחי סוכר שונים ובימים שונים במהלך נשיאת החייושן. התוצאות בטווחי סוכר של 80 מ"ג/ד"ל או פחות משקפות את אחוז הערכים בתוך המ"ג/ד"ל, והתוצאות בטווחי סוכר הגבוהים מ-80 מ"ג/ד"ל משקפות את האחוז בתוך הייחוס. לדוגמה, ערכי סוכר בין 40 ו-60 מ"ג/ד"ל היו בתוך 15 מ"ג/ד"ל של ערך הייחוס 91.6% בכל הזמן.

### טבלה 3 – אחוז קריאות Eversense E3 בסך הכל בהסכמה במחקר PROMISE

אחוז של קריאות מערכת CGM בתוך					CGM ו-YSI ייחוס מחוברים	טווח סוכר מערכת CGM (מ"ג/ד"ל)
אחוז 40/40% < של ייחוס	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס		
0.4	99.6	98.6	93.9	87.3	12,034	סך הכל
0.7	99.3	98.6	96.5	91.6	574	60 - 40
0.2	99.8	98.9	93.8	89.7	1,178	80 - 61
0.4	99.6	98.5	93.2	85.1	5,078	180 - 81
0.4	99.6	98.4	93.7	87.0	3,493	300 - 181
0.4	99.6	99.2	96.8	93.3	1,191	350 - 301
0.4	99.6	98.7	93.8	87.3	520	400 - 351

טבלה 4 – דיוק מערכת Eversense E3 על פי ימים

אחוז של קריאות מערכת CGM בתוך					הבדל יחסי מוחלט ממוצע	יום
אחוז 40/40% < של ייחוס	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס		
0.7	99.3	96.5	87.4	78.6	11.2	יום 1
1.5	98.5	94.7	88.0	81.9	10.0	יום 7
0.0	100.0	99.0	95.0	87.4	7.4	יום 14
0.1	99.9	99.2	95.7	88.9	8.4	יום 22
0.7	99.3	98.2	93.4	85.8	8.2	יום 30
0.2	99.8	98.6	94.2	87.9	8.6	יום 60
0.1	99.9	99.8	97.1	93.1	7.0	יום 90
0.1	99.9	99.6	96.1	89.2	8.4	יום 120
0.1	99.9	99.5	91.9	84.0	8.8	יום 150
0.3	99.7	99.3	98.0	93.1	7.4	יום 180

## ביצוע התרעת E3 Eversense

הטבלאות בחלק זה מראות הערכת ביצוע, התרעה שיעור איתור האירוע המאושר מראה את אחוז הזמן שמערכת ה-E3 CGM Eversense אישרה את ערך הייחוס על ידי הצגה של התרעה בתוך חלון זמן של 15 דקות של ערך ייחוס מעבר לסף ההתרעה המוגדר. שיעור האיתור המפוספס מראה את אחוז הזמן שמערכת ה-E3 CGM Eversense לא הציגה התרעה בתוך חלון זמן של 15 דקות של ערך ייחוס מעבר לסף ההתרעה המוגדר. שיעור ההתרעה האמיתי מראה את אחוז הזמן שבו ההתרעה ממערכת ה-CGM אושר על ידי ערך הייחוס בתוך חלון זמן של 15 דקות מזמן ההצגה של ההתרעה. שיעור ההתרעה הכוזב מראה את אחוז הזמן שבו ההתרעה ממערכת ה-CGM לא אושר על ידי ערך הייחוס בתוך חלון זמן של 15 דקות מזמן ההצגה של ההתרעה.

הטבלה למטה מראה הערכה של יכולת מערכת ה-Eversense E3 CGM לאתר רמות סוכר גבוהות ונמוכות והיא מעריכה התרעות חיוביות אמיתיות בניגוד להתרעות חיוביות כוזבות. ניתן לראות אותן כאחוז של התרעות אשר ניתנו ביחס לערכי הייחוס YSI בספים שונים.

**טבלה 5 – ביצוע התרעות סוכר גבוהות ונמוכות של Eversense E3 (qf בלבד) במחקר PROMISE**

שיעור התרעה כוזב	שיעור התרעה אמיתי	שיעור איתור מפוספס	שיעור איתור אירוע מאושר	הגדרת התרעה (מ"ג/ד"ל)	
18%	82%	24%	76%	60	התרעה נמוכה
10%	90%	11%	89%	70	
8%	92%	7%	93%	80	
7%	93%	4%	96%	90	
3%	97%	1%	99%	120	התרעה גבוהה
4%	96%	1%	99%	140	
5%	95%	2%	98%	180	
5%	95%	3%	97%	200	
5%	95%	3%	97%	220	
6%	94%	3%	97%	240	
10%	90%	12%	88%	300	

הטבלה למטה מראה הערכה של יכולת מערכת ה-Eversense E3 CGM לאתר התרעות גבוהות, נמוכות, והתרעות מנבאות גבוהות ונמוכות, והיא מעריכה התרעות חיוביות אמטיות בניגוד להתרעות חיוביות כוזבות. ניתן לראות אותן כאחוז של התרעות אשר ניתנו ביחס לערכי הייחוס YSI בספים שונים.

### טבלה 6 – ביצוע התרעות גבוהות, נמוכות ומנבאות של Eversense E3 (סף בלבד) במחקר PROMISE

שיעור התרעה כוזב	שיעור התרעה אמתי	שיעור איתור מפוספס	שיעור איתור אירוע מאושר	הגדרת התרעה (מ"ג/ד"ל)	
27%	73%	10%	90%	60	התרעה נמוכה
16%	84%	6%	94%	70	
13%	87%	3%	97%	80	
11%	89%	2%	98%	90	
4%	96%	1%	99%	120	התרעה גבוהה
5%	95%	1%	99%	140	
7%	93%	1%	99%	180	
7%	93%	1%	99%	200	
8%	92%	2%	98%	220	
9%	91%	2%	98%	240	
13%	87%	8%	92%	300	

### Eversense E3 הסכמת מגמת שיעור השינוי

האזור המוצלל בטבלה למטה מראה את ההסכמה בין מגמות הסוכר של Eversense E3 ומגמות הייחוס YSI בעוד שמגמת הסוכר היא בשיעורים שונים (מ"ג/ד"ל לדקה). לדוגמה, כאשר מגמת הסוכר נעה בשיעור בין 1- ו-1 מ"ג/ד"ל לדקה, מגמות הסוכר של Eversense E3 מסכימות עם מגמות הייחוס ב-90% מן הזמן.

### טבלה 7 – הסכמת מגמת שיעור השינוי Eversense E3 במחקר PROMISE

אחוז של חיבורים תואמים בשיעור השינוי של הייחוס (מ"ג/ד"ל לדקה) בכל טווח מגמת ייחוס עבור כל טווח CGM ROC						מגמת CGM (מ"ג/ד"ל לדקה)
סך הכל	2 <	[2 ,1)	[1 , -1]	(-1 , -2]	-2 >	
163	0%	0%	41%	35%	24%	-2 >
824	0%	0%	59%	36%	4%	(-1 , -2]
8,716	1%	5%	90%	4%	0%	[1 , -1]
896	11%	42%	46%	1%	0%	[2 , 1)
336	35%	40%	24%	0%	0%	2 <
10,935						

## ההסכמה הכללית של Eversense E3 עם ערכי YSI

האזור המוצלל בטבלאות למטה מראה איזה אחוז של ערכי ייחוס YSI היו באותו הטווח של ערכי הסוכר בחיישן. לדוגמה, כאשר הסוכר בחיישן הוא בין 81 ו-120 מ"ג/ד"ל, ערכי הייחוס YSI הם באותו הטווח ב-76% מן הזמן.

### טבלה 8 – הסכמה כללית עם טווח YSI בכל הימים במחקר PROMISE

אחוז של חיבורים תואמים בכל טווח סוכר YSI עבור כל טווח סוכר CGM YSI (מ"ג/ד"ל)											מספר קריאות CGM-YSI מחוברות	CGM (מ"ג/ד"ל)
400 <	351-400	301-350	251-300	201-250	161-200	121-160	81-120	61-80	40-60	40 >		
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	36%	62%	0%	574	60 - 40
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	66%	19%	0%	1,178	80 - 61
0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	76%	11%	0%	0%	2,066	120 - 81
0%	0%	0%	0%	0%	14%	71%	14%	0%	0%	0%	2,067	160 - 121
0%	0%	0%	0%	13%	66%	21%	0%	0%	0%	0%	1,648	200 - 161
0%	0%	1%	15%	68%	15%	1%	0%	0%	0%	0%	1,437	250 - 201
0%	1%	25%	56%	17%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1,353	300 - 251
0%	12%	70%	17%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,191	350 - 301
5%	42%	51%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	520	400 - 351
26%	52%	21%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	155	400 <

## טבלה 9 – הסכמה כללית עם טווח YSI ביום 1 במחקר PROMISE

אחוז של חיבורים תואמים בכל טווח סוכר YSI עבור כל טווח סוכר CGM YSI (מ"ג/ד"ל)											מספר קריאות CGM-YSI מחוברות	CGM (מ"ג/ד"ל)
400 <	351-400	301-350	251-300	201-250	161-200	121-160	81-120	61-80	40-60	40 >		
0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	45%	51%	0%	120	60 - 40
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	54%	10%	0%	146	80 - 61
0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	70%	5%	0%	0%	271	120 - 81
0%	0%	0%	0%	3%	21%	62%	14%	0%	0%	0%	202	160 - 121
0%	0%	0%	0%	16%	51%	33%	0%	0%	0%	0%	124	200 - 161
0%	0%	0%	27%	51%	19%	4%	0%	0%	0%	0%	75	250 - 201
0%	0%	18%	57%	24%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	121	300 - 251
0%	0%	64%	33%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86	350 - 301
0%	9%	84%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58	400 - 351
0%	48%	48%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25	400 <

## הסכמת יציבות כיול

הטבלה למטה משווה את אחוז ערכי הסוכר בחיישן אל ייחוס YSI- בנקודות זמן שונות לאחר הזנת כיול. לדוגמה, בטבלה למטה, 89.7% מערכי ה-E3 Eversense נמצאים בתוך 15 מ"ג/ד"ל (עבור קריאות ייחוס של 80 מ"ג/ד"ל או פחות), ובתוך 15% (עבור קריאות ייחוס הגבוהות מ-80 מ"ג/ד"ל) של ערך הייחוס בתוך 8 עד 10 שעות לאחר הזנת הכיול.

### טבלה 10 – הסכמת יציבות כיול E3 Eversense במחקר PROMISE

אחוז של קריאות מערכת CGM בתוך					מספר קריאות CGM-YSI מחוברות	זמן שעבר מן הכיול
אחוז 40/40% < של ייחוס	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס		
0.1	99.9	98.7	94.1	88.8	2,638	(2, 0) שעות
0.5	99.5	98.5	94.4	87.2	1,905	[2, 4) שעות
0.7	99.3	98.1	93.3	85.3	1,404	[4, 6) שעות
0.4	99.6	97.7	91.5	83.0	1,043	[6, 8) שעות
0.4	99.6	98.8	93.9	89.7	1,041	[8, 10) שעות
0.5	99.5	97.7	94.1	87.8	1,091	[10, 12) שעות
0.7	99.3	99.0	93.4	85.8	590	[12, 14) שעות
0.0	100.0	100.0	91.8	82.7	440	[14, 16) שעות
0.0	100.0	99.5	93.9	87.6	379	[16, 18) שעות
0.3	99.7	98.4	97.0	90.0	370	[18, 20) שעות

## טבלה 10 – הסכמת יציבות כיוול Eversense E3 במחקר PROMISE (המשך)

אחוז של קריאות מערכת CGM בתוך					מספר קריאות CGM-YSI מחוברות	זמן שעבר מן הכיוול
אחוז 40/40% < של ייחוס	אחוז 40/40% של ייחוס	אחוז 30/30% של ייחוס	אחוז 20/20% של ייחוס	אחוז 15/15% של ייחוס		
0.2	99.8	99.5	94.5	88.3	436	[20, 22] שעות
0.2	99.8	99.4	96.2	89.7	522	[22, 24] שעות
0.0	100.0	99.4	98.2	93.5	168	[24, 26] שעות
0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	7	[26, 28] שעות

### חיי החיישן

חיי החיישן נמדדים כאחוז החיישנים המסוגלים לתפקד לכל תקופת ה-180 ימים המיועדת לכך. במחקר PROMISE, 90% מן החיישנים תפקדו לכל תקופת ה-180 ימים. מספר הימים הממוצע היה 175.

### אחוז החיישנים שהחזיקו מעמד 60, 120 ו-180 ימים

מספר ממוצע של ימים	חיי החיישן	ימים
175	98%	60
	98%	120
	90%	180

## בטיחות

מחקר PROMISE ארך 180 ימים בהם תועד מספר אירועי הלוואי המקושרים אליו. מערכת ה-Eversense E3 CGM נסבלה היטב כחלק מן המחקר. במהלך 31,373 הימים בהם החיישן נישא כחלק מן המחקר, לא תועדו אירועי לוואי לא צפויים. חמישים ושבעה אירועי לוואי תועדו עבור 37 משתתפים. אף אחד מאירועי הלוואי לא הסתיים באשפוז.

**טבלה 11 – אירועי לוואי (כל המשתתפים, n = 181)**

מספר משתתפים (% מן המשתתפים)	מספר אירועים	סוג אירוע
37 (20.4)	59	
11 (6.1)	16	פריחה בעור, מיקום מדבקה דביקה או אתר החדרה (כולל אדמנת, עקצוץ, פריחה, דרמטיטיס מגע, סרומה)
4 (2.2)	4	דילול עור
3 (1.7)	4	היפופיגמנטציה
2 (1.1)	2	זיהום (קשור להליך)
1 (0.6)	1	זיהום (לא קשור להליך)
11 (6.1)	19	חבלה
3 (1.7)	3	דימום
6 (3.3)	7	כאב
1 (0.6)	1	חוסר תחושה בזרוע
1 (0.6)	1	צמרמורת
1 (0.6)	1	רצועת הסגירה של המדבקה הדביקה לא החזיקה

# 20. נתונים טכניים

## חיישן

מאפיינים	תיאור
מידות	אורך: 18.3 מ"מ קוטר: 3.5 מ"מ
חומרים	הומופולימר פולימתיל מתאקרילט 86mg (PMMA), הידרוג'ל על בסיס הידרוקסיאתיל-מתקרילאט (HEMA) המכיל אינדיקטור סוכר - 2.0 מ"ג, פלטינה - 0.012 מ"ג, סיליקון - 4.1 מ"ג, דקסמתזון אצטט - 1.7 מ"ג, דבק אפוקסי 2-301 - 0.62 מ"ג
טווח הסוכר	40 - 400 מ"ג/ד"ל
חיי החיישן	עד 180 ימים
כיול	מד סוכר בדם הזמין מסחרית לניטור עצמי
טווח כיול	40 - 400 מ"ג/ד"ל
חיטוי	מעוקר על ידי אתילן אוקסיד

מאפיינים	תיאור
מידות	אורך: 48.0 מ"מ רוחב: 37.6 מ"מ עובי: 8.8 מ"מ
חומרים	גוף: פוליקרבונט
משקל	11.3 ג'
מקור מתח	סוללות ליתיום-פולימר הניתנות לטעינה (לא ניתנות להחלפה)
תנאי הפעלה	5-40°C (41 - 104 °F)
חיי תפעול	12 חודשים
תנאי אחסון	0-35°C (32 - 95 °F)
הגנה מפני לחות	IP67: נטבל במים עד לעומק של מטר אחד לתקופה של עד 30 דקות
הגנה מפני שוק חשמלי	חלק מיושם סוג BF
זמן טעינה על ידי שימוש במתאם AC	15 דקות עד לטעינה מלאה
מרחק תקשורת	בין האפליקציה והמשדר החכם הוא עד ל-24.9 רגל התקשורת האלחוטית אל האפליקציה לא תתפקד היטב כאשר מתבצעת תקשורת דרך מים. הטווח יופחת אם אתה נמצא באמבטיה, על גבי מיטת מים, בברכה, וכד'.
לחץ התא	700 hPa עד 1060 hPa
טווח לחות יחסי (ללא עיבוי)	15% עד 90%
גובה מעל פני הים	10,000 רגל

## מקור מתח ומטען

מאפיינים	תיאור
סוג	II
קלט	קלט זרם חלופי, 100-240Vac, 50/60Hz, 0.3-0.15A
פלט זרם ישיר	5V DC, 1A (5.0 ואט)
הגנה מפני לחות (עריסת טעינה)	IP22

## כבל USB לטעינה והורדת נתונים

מאפיינים	תיאור
קלט/פלט	5V DC, 1A
סוג	USB-A ל-USB-B מיקרו-B
אורך	91 ס"מ (36 אינצ')

\*אם נעשה בו שימוש לא נכון, כבל ה-USB עלול להוות סכנת חניקה. ניתן לחבר את כבל ה-USB אל מקור המתח/המטען ולבצע טעינה על ידי שימוש בשקע מחת זרם חלופי. על מנת לבודד את המערכת, נתק את המטען/מקור המתח מן התקע. אם אתה מטעין את המשדר החכם על ידי שימוש ביציאת USB על גבי המחשב האישי שלך, וודא שהמחשב האישי שלך עומד בתקן הבטיחות IEC 60950-1 (או דומה).

## תקנים חשמליים ותקני בטיחות

### הדרכה והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית

המשדר מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המצוינת בטבלה הבאה. הלקוח או המשתמש במשדר צריך להבטיח שנעשה בו שימוש בסביבה שכזו.


### מפרטי חסינות אלקטרומגנטית עבור המשדר

הנחייה לסביבה אלקטרומגנטית	רמת הציות של המשדר	בדיקת חסינות	בדיקת חסינות
על הרצפות להיות מעץ, בטון או אריחי קרמיקה. אם הרצפות מצופות בחומר סינתטי, על הלחות היחסית להיות לפחות 30%.	$8 \pm$ kV חיבור $15 \pm$ kV אוויר	$8 \pm$ kV חיבור $15 \pm$ kV אוויר	פליטה אלקטרוסטטית (ESD) IEC 61000-4-2
השדות המגנטיים של תדירות המתח צריכים להיות ברמות המאפיינות מקום טיפוס בסביבה מסחרית או סביבת בית חולים טיפוסית.	A/m 30	A/m 30	תדירות מתח 110VAC/60Hz,) (230VAC/50 Hz שדה מגנטי IEC 61000-4-8

## תקנים חשמליים ותקני בטיחות (המשך)

מערכת Eversense E3 CGM מיועדת לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת בטבלה למטה. משתמשי המערכת יודאו שהיא בשימוש בהתאם להוראות אלו.

### הוראות החסינות האלקטרומגנטית של המערכת

מדרוך סביבה אלקטרומגנטית	רמת הציות של המשדר	IEC 60601 רמת בדיקה	בדיקת חסינות
תיתכן הפרעה בסביבת ציוד המסומן עם הסמל הבא: 	Vrms 3	Vrms 3 ≤ עד 150 kHz (80 MHz)	RF מוליך IEC 61000-4-6 (טלפון חכם בלבד (מכשיר מקבל))
	Vrms 3	V/m 10 ≤ ב-80 MHz עד 2700 MHz (אפנון AM)	RF מוקרן IEC 61000-4-3

**הערה 1:** ב-80 MHz ו-800 MHz, טווח התדירות הגבוה יותר מיושם.  
**הערה 2:** ייתכן וקווים מנחים אלו לא יהיו נכונים לכל המצבים. ההתפשטות האלקטרומגנטית מושפעת מקליטה וקרינה ממבנים, עצמים ואנשים.

- א. חוזק שדה ממשרדים קבועים, כגון תחנות בסיס עבור טלפוני (סלולריות/אלחוטיות) רדיו ומכשירי רדיו קרקע ניידים, רדיו חובבני, שידורי רדיו AM ו-FM ושידורי טלוויזיה לא ניתנים לחיזוי תאורטי בדיוק. על מנת להעריך את הסביבה האלקטרומגנטית הנגרמת בשל משדרי RF קבועים, יש לקחת בחשבון סקר אלקטרומגנטי של האתר. אם חוזק השדה הנמדד במקום בו מערכת Eversense E3 CGM נמצאת בשימוש עולה על רמת ה-RF המיושמת הנ"ל, יש לוודא שמערכת Eversense E3 CGM פועלת כהלכה. אם מבחינים בביצועים שאינם נורמליים, ייתכן שיהיה צורך בצעדים נוספים, כגון הכוונה מחדש או מיקום מחדש של מערכת ה-Eversense E3 CGM.
- ב. מעל טווח התדירות 150 kHz עד 80 MHz, חוזק השדה צריך להיות פחות מ-10 V/m.

## תקנים חשמליים ותקני בטיחות (המשך)

### הדרכה והצהרת היצרן – פליטות אלקטרומגנטיות

מערכת Eversense E3 CGM מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המופיעה בטבלה למטה. לקוחות או משתמשי המערכת יודאו שהיא בשימוש בהתאם להוראות אלו.

הנחייה לסביבה אלקטרומגנטית	ציות	בדיקת פליטה
מערכת ה-Eversense E3 CGM עושה שימוש באנרגיית RF עבור תפקוד פנימי בלבד. לכן, פליטות ה-RF שלה מאוד נמוכות וקיים סיכוי נמוך שהמערכת תיצור התערבות בצידוד חשמלי הנמצא בקרבת מקום.	קבוצה 1	פליטות RF CISPR 11
מערכת Eversense E3 CGM מתאימה לשימוש בכל הממסדים כולל ביתיים ואלו המחוברים באופן ישיר לרשת אספקת החשמל הציבורית במתח נמוך המסופקת לבניינים המשמשים למטרות מגורים.	B 10	פליטות RF CISPR 11

### מרחקי הפרדה מומלצים בין ציודי תקשורת RF נישאים/ניידים אחרים והטלפון החכם (המכשיר המקבל)

פעלו בהתאם להוראות היצרן של הטלפון החכם (או מכשירים מקבלים אחרים) בנוגע למרחקי הפרדה. הלקוח או המשתמש בטלפון החכם (או הכל מכשיר מקבל אחר) יכול לעזור למנוע הפרעה אלקטרומגנטית על ידי שמירה של מרחק מינימלי בין ציודי תקשורת RF נישאים/ניידים אחרים (משדרים) והטלפון הנייד של לפחות 30 ס"מ (12 אינץ'). ציודי תקשורת RF נישאים/ניידים כוללים: מכשירי ניטור לתינוקות, אזניות Bluetooth אלחוטיות, נתבים אלחוטיים, תנורי מיקרוגל, מחשבים ניידים עם מתאמי Wi-Fi פנימיים, טלפוני GSM, סורקי RFID וגלאי מתכות המוחזקים ביד הנמצאים תכופות בשימוש בסריקות ביטחוניות.

## מולים באפליקציה Eversense CGM

הסבר	סמל
<p><b>Glucose Alert (התרעה על סוכר)</b>                      מופיע כאשר רמת הסוכר נמצאת מעל לטווח ההתרעה עבור רמת הסוכר הגבוהה ומתחת לטווח ההתרעה עבור רמת הסוכר הנמוכה. הסמל מופיע במסך <b>ALERT HISTORY</b> (היסטוריית התרעות).</p>	
<p><b>התרעת חיזוי נמוכה או התרעת נפילת שיעור</b>                      מציין שהתרעת חיזוי נמוכה או התרעת נפילת שיעור התרחשה. הסמל מופיע במסך <b>ALERT HISTORY</b> (היסטוריית התרעות) ועל גבי קו המגמה במסך הבית.</p>	
<p><b>התרעת חיזוי גבוהה או התרעת עליית שיעור</b>                      מציין שהתרעת חיזוי גבוהה או התרעת עליית שיעור התרחשה. הסמל מופיע במסך <b>ALERT HISTORY</b> (היסטוריית התרעות) ועל גבי קו המגמה במסך הבית.</p>	
<p><b>Empty Battery Alert (התרעת סוללה ריקה)</b>                      סמל זה מופיע כאשר סוללת המשדר החכם ריקה.</p>	
<p><b>Low Battery Alert (התרעה על סוללה חלשה)</b>                      סמל זה מופיע כאשר רמת הטעינה של סוללת המשדר החכם טעונה בפחות מ-10%.</p>	
<p><b>Smart Transmitter/Sensor Alert (התרעה על משדר חכם/חיישן)</b>                      הסמל מופיע במסך <b>ALERT HISTORY</b> (היסטוריית התרעות).</p>	
<p><b>Smart Transmitter/Sensor Notifications (הודעות על משדר חכם/חיישן)</b>                      סמל זה מופיע כאשר מוצגות הודעות הקשורות למשדר החכם או לחיישן.</p>	
<p><b>Calibration Alert (התרעת כיול)</b>                      סמל זה מופיע כאשר ישנן התרעות הקשורות לכיול.</p>	
<p><b>Calibration Notification (הודעה על כיול)</b>                      מופיע במסך <b>ALERT HISTORY</b> (היסטוריית התרעות) כאשר ישנן הודעות הקשורות לכיול. הסמל גם מופיע בקו המגמה של הסוכר שלי וביומן האירועים כאשר מתבצעת הזנת BG ידנית.</p>	


## מולים באפליקציה Eversense CGM (המשך)

הסבר	סמל
<p><b>הכילול התקבל</b> מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וב-<b>EVENT LOG</b> (יומן האירועים) כאשר כילול מסוים מוזן ומתקבל.</p>	
<p><b>מתבצע כילול</b> מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וביומן האירועים במהלך כ-15 דקות בהן מתבצע הכילול. הסמל יכול להפוך לאדום, שחור או כחול כאשר כבר לא מתבצע כילול.</p>	
<p><b>כילול לא הושלם</b> מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וביומן האירועים כאשר לא נאספו מספיק נתונים על מנת להשלים את הכילול. לדוגמה, כאשר המשדר מוסר מעל לחיישן במהלך כ-15 דקות בהן מתבצע הכילול.</p>	
<p><b>לא ניתן להשתמש בכילול</b> מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וביומן האירועים כאשר כילול מסוים מוזן אך לא ניתן להשתמש בו. לדוגמה, הערך המוזן נמוך מ-40 מ"ג/ד"ל או גבוה מ-400 מ"ג/ד"ל. במקרה זה, ערך הכילול מאוחסן כהזנת BG ידנית.</p>	
<p><b>חיבור מערכת מוצלח</b> סמל זה מופיע כאשר המשדר החכם מתחבר אל הטלפון החכם והחיישן מקושר למשדר החכם. הקווים מציינים את חוזק החיבור.</p>	
<p><b>חיבור משדר וחיישן</b> מופיע לפני שהמשדר מחובר אל חיישן וכאשר החיבור בין משדר לחיישן נקטע.</p>	
<p><b>חיבור משדר ואפליקציה ניידת</b> מופיע כאשר חיבור ה-BLE בין המשדר והאפליקציה נקטע.</p>	

## מולים באפליקציה Eversense CGM (המשך)

הסבר	סמל
<p><b>התרעות מרובות (יותר מהתרעה אחת או אירוע אחד)</b>                      סמל זה מופיע כאשר מוצגים שני אירועים או התרעות או יותר במרווח זמן קצר.</p>	
<p><b>סמלי אירוע</b>                      מופיע על גבי קו המגמה של הסוכר וב-<b>EVENT LOG</b> (יומן האירועים) לאחר הזנת אירוע. האירועים אותם ניתן להזין הם:</p> <p> <span>פעילות גופנית</span>  <span>אינסולין</span>  <span>סוכר</span>  </p> <p> <span>בריאות</span>  <span>ארוחות</span>  </p>	
<p><b>פרופיל זמני</b>                      סמל זה מופיע כאשר הפרופיל הזמני פעיל.</p>	
<p><b>מצב 'נא לא להפריע' (DND)</b>                      סמל זה מופיע כאשר הדגרת ה-DND פעילה.</p>	

## סמלים על אריזות ומכשירים

הסבר	סמל
מק"ט	
מספר סידורי	
חלק מיושם סוג BF	
קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת	
מיוצר ללא גומי לטקס טבעי	
מזהה FCC מוצמד לכל המכשירים הכפופים לאישור	<b>FCC ID</b>
לא סטרילי	

הסבר	סמל
עיין במסמכים הנלווים	
מחווון הוראות אלקטרוניות לשימוש	
זהירות, עיין במסמכים הנלווים	
בשימוש על ידי	
יצרן	
תאריך יצור	
הגבלות טמפרטורות אחסון	
מספר קבוצת פריטים	<b>LOT</b>
אפיק טורי אוניברסלי (USB)	


## סמלים על אריזות ומכשירים (המשך)

הסבר	סמל
אין להשתמש אם האריזה פגומה	
עוקר באמצעות אתילן אוקסיד	<b>STERILE EO</b>
מחסום עיקור יחיד: עוקר באמצעות אתילן אוקסיד	
חוקי ארה"ב (פדרליים) מגבילים את המכירה של מערכת Eversense E3 CGM למכירה על ידי או בהזמנת רופא	<b>Rx only</b>
עקבו אחר ההוראות לשימוש	
הסימון מאשר שהמכשיר עומד בתקנת ההתקנים הרפואיים 2017/745	<b>CE</b> <sup>2797</sup>
התקן רפואי (הערה: בכרטיס השתל, דבר זה מציין את שם ההתקן)	<b>MD</b>

הסבר	סמל
קיימת התווית נגד להדמיה בתהודה מגנטית (MRI) עם המשדר החכם	
תלוי MRI. עצם אשר הוכח כבטוח בסביבת MR בתנאים המוגדרים הכוללים תנאים עבור השדה המגנטי הסטטי, השדות המגנטיים המדורגים על פי זמן ושדות תדירות הרדיו. למידע מלא יש לעיין בסעיף מידע בטיחות ל-MRI.	
הנחיית האיחוד האירופי WEEE 2012/19/EU	
מיועד לשימוש של מטופל יחיד	
אין לעקר מחדש	

## סמלים על אריזות ומכשירים (המשך)

הסבר	סמל
מכיל חומרים רפואיים	
מידע בנוגע למחזור	
מפיץ	

הסבר	סמל
מזהה התקן ייחודי	
תאריך החדרה	
מרכז רפואי להשתלות או רופא	
מזהה מטופל (שם)	
אתר המידע של המטופל	
יבואן	
נציג מורשה בקהילה האירופית	
עבור מטופל אחד לשימוש חוזר	

### 1. כיסוי ומשך אחריות מוגבלת.

("Senseonics") Senseonics, Incorporated ("Senseonics") מספקת אחריות למטופל המקורי משתמש הקצה ("אתה") של המשדר החכם של Eversense E3 ("המשדר החכם") כך שהמשדר החכם יהיה נקי מפגמים בחומרים ומיומנות תחת תנאי שימוש נורמליים לתקופה של שנה אחת (365 ימים) המתחילה בתאריך בו קיבלת לראשונה את המשדר החכם מהצוות הרפואי שלך ("תקופת האחריות המוגבלת"). אחריות זו נותנת לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שתהיינה לך גם זכויות אחרות אשר שונות מסמכות משפטית אחת לשנייה. אחריות מוגבלת זו נכנסת לתוקפה בתנאי שאתה מספק ל-Senseonics בכתב על כל פגם בחומרים ו/או במיומנות מיד לאחר איתורם, ובכפוף לעובדה ש-Senseonics קובעת שתביעתך התקבלה בשל פגמים מקוריים בחומרים ו/או במיומנות. אם Senseonics מספקת לך משדר החכם חלופי בהתאם להוראות אחריות מוגבלת זו, כל אחריות שנתרה מן המשדר החכם המקורי תועבר למחליף המשדר החכם, כאשר סיום תקופת האחריות עבור המשדר החכם החלופי יהיה ביום השנה ליום שבו קיבלת לראשונה את המשדר החכם שלך מהצוות הרפואי שלך, והאחריות תסתיים בהתאם לאחריות המשדר החכם המקורי.

### 2. החרגות לאחריות מוגבלת.

האחריות המוגבלת מתייחסת רק למשדרים חכמים המיוצרים על ידי Senseonics, והיא מותנה בשימוש מתאים של המוצר על ידך. האחריות המוגבלת איננה מכסה (א) נזקים קוסמטיים, שריטות או נזקים אחרים למשטחים וחלקים חשופים בשל שימוש נורמלי; (ב) נזקים בתוצאה מתאונות, הזנחה או כל רשלנות אחרת, שימוש לא נכון, לחץ פיזי, חשמלי או אלקטרומגנטי לא רגיל, או כל שינוי בכל חלק של המוצר; (ג) ציוד אשר שונה או הוסר, אשר מספר הזיהוי שלו שונה או הפך ללא קריא בכל דרך אחרת; (ד) פגמים כתוצאה משימוש ביחד עם מוצרים, אביזרים או ציוד היקפי אשר לא סופק או אושר בכתב על ידי Senseonics; (ה) מצרכים (סוללות); (ו) ציוד אשר פורק ו-; (ז) נזקים כתוצאה מהפעלה, בדיקות, תחזוקה, התקנה או כיוונים לא מתאימים. המשדר החכם עמיד למים על פי המפרטים המופיעים במדריך למשתמש. אחריות מוגבלת זו איננה מכסה נזקי מים אם כיסוי המשדר החכם נסדק, או בעל נזק כלשהו. אחריות מוגבלת זו לא תיושם עבור שירותים צדדיים, ציוד או תכנה אשר יכולים להיות בשימוש ביחד עם המשדר החכם.

### 3. חובותיה של Senseonics תחת אחריות מוגבלת זו.

התרופה היחידה והבלעדית שלך, והחובה היחידה והבלעדית של Senseonics תחת אחריות מוגבלת זו היא לתקן או להחליף, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל תשלום נוסף מצדך, כל משדר חכם פגום, בתנאי שהפגם מתרחש ותביעה תקפה מתקבלת על ידי Senseonics בתקופת האחריות המוגבלת. עליך להחזיר את המשדר החכם הפגום למחלקת שירות לקוחות מורשית של Senseonics בחבילת משלוח מתאימה אשר תגונן כהלכה על המשדר החכם מפני כל נזק נוסף, ביחד עם השם והכתובת שלך, השם והכתובת של הצוות הרפואי ממנו קיבלת את המשדר החכם, התאריך ומספר הזיהוי של המשדר החכם. כדי לברר להיכן לשלוח את המשדר החכם, אנא בקר באתר שלנו <https://global.eversensedidiabetes.com>. בעת הקבלה, אם Senseonics מחליטה שהמשדר החכם מכוסה על ידי האחריות המוגבלת והכיסוי לא נדחה, Senseonics תחליף מיד את המשדר החכם. אם Senseonics מחליטה שהמשדר החכם איננו מכוסה על ידי האחריות המוגבלת, אתה יכול לרכוש תחליף או אם אתה רוצה שהמשדר החכם המקורי יוחזר אליך, עליך לשאת בכל הוצאות המשלוח מראש.

משדר חכם אשר תוקן או הוחלף מקבל על עצמו את תקופת האחריות שנותרה מן המשדר החכם המקורי, או [30] ימים מתאריך התיקון או ההחלפה, הארוכה מביניהן.

### 4. הגבלות לחובות Senseonics תחת האחריות המוגבלת.

האחריות המוגבלת של SENSEONICS המתוארת למעלה היא בלעדית ובאה במקום כל אחריות אחרת, ברורה או מרומזת, הן למעשה או על פי פעולת החוק, סטטוטורית או אחרת, ו-SENSEONICS מדירה ומוותרת באופן מפורש על כל אחריות אחרות, כולל אך לא רק, כל אחריות מרומזת או תנאי סחירות מסוים, אחריות התאמה למטרה מסוימת, אחריות נגד הפרה, אחריות איכות מספקת, אחריות אי-הפרעה, אחריות לדיוק או תוכן המכיל מידע, או כל אחריות העולה מתהליך העסקה, מן החוק, נהלי השימוש או המסחר. למעט עד למידה האסורה על ידי החוקים הרלוונטיים, SENSEONICS לא תהיה אחראית לכל נזק מיוחד, מקרי, תוצאתי או בלתי ישיר, באם כתוצאה מכל תאריה של חובה, העולה בכל דרך מן המכירה, השימוש, השימוש הלא נאות, או חוסר היכולת להשתמש במשדרים החכמים או בכל מערכת אחרת EVERSENSE E3. הגבלה זו תהיה בתוקפה גם אם SENSEONICS סוכנה יודעו בנוגע לנזקים הנ"ל ולמרות כל כישלון של המטרה העיקרית של תרופה מוגבלת זו. אחריות מוגבלת זו לא תורחב לאף אחד אחר מלבדך, משתמש הקצה המקורי של מוצר זה והיא מצהירה על התרופה הבלעדית עבורך. אם כל חלק באחריות מוגבלת זו איננו חוקי או לא

ניתן לאכיפה מכל סיבה בחוק, עד למידה בה SENSEONICS לא תוכל, בהתאם לחוק הרלוונטי, לוותר על כל אחריות מרומזת או להגביל את חובותיה, ההיקף והתקופה של כל אחריות שכזו וההרחבה של אחריות SENSEONICS יהיו המידה המינימלית המורשית על ידי החוק הרלוונטי הנ"ל.

# Eversense DMS .21

## מבוא

### השימוש המיועד

המערכת לניהול נתונים של Eversense (DMS) מיועדת לשימוש כאביזר למוצרי Eversense CGM תואמים. זוהי אפליקציה מבוססת אינטרנט שניתנת לשימוש על מנת לראות, לנתח ולאחסן נתוני סוכר ממערכת ה-Eversense CGM שלך.

למידע נוסף על דפדפנים וגרסאות דפדפן תואמים, אנא בקר בכתובת [global.eversenseddiabetes.com/compatibility](https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility).

**חשוב:** המערכת לניהול הנתונים של **EVERSENSE** איננה מספקת עצות רפואיות. אין לקבל החלטות טיפול מבלי להתייעץ עם הצוות הרפואי שלך.

### הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות

השימוש ב-Eversense DMS כפוף לתנאים ולהתניות של הסכם הרישיון למשתמש קצה העדכני ביותר של אפליקציית Eversense ולמדיניות הפרטיות של אפליקציית Eversense. מסמכים אלו מעודכנים מעת לעת ומוצגים באתר [global.eversenseddiabetes.com](https://global.eversenseddiabetes.com).

### עזרה ותמיכה

אם אינך מבין משהו במדריך זה למשתמש, צור קשר עם המפיץ המקומי או בקר באתר [global.eversenseddiabetes.com](https://global.eversenseddiabetes.com) על מנת לראות מיהו המפיץ המקומי באזורך.

# תחילת השימוש

ה-Eversense DMS היא אפליקציה מבוססת דפדפן אינטרנט (אפליקציית אינטרנט) המאפשרת לך להעלות באופן אוטומטי את הנתונים מאפליקציית Eversense הניידת שלך מן המכשיר החכם התואם אל האינטרנט עבור אחסון ממושך וסקירה.

תכנת המחשב מאפשרת למחשב שלך לתקשר ישירות עם אפליקציית האינטרנט. אתה יכול גם להעלות את הנתונים שלך ישירות מן המשדר החכם אל חשבון ה-Eversense DMS שלך באמצעות חיבור כבל על ידי הורדה והתקנה של תכנת המחשב ללקוח Eversense היישר אל המחשב האישי שלך.

## צור חשבון חדש

לפני השימוש ב-Eversense DMS, יהיה עליך להירשם כמשתמש.

אם כבר יצרת ורשמת חשבון באפליקציית Eversense לנייד, כבר יש לך חשבון Eversense DMS, ואין לך צורך ליצור ולרשום חשבון חדש. עבור לדף הבא עבור השלבים לכניסה לחשבון שלך.

1. עבור אל

[global.eversensedms.com](https://global.eversensedms.com)

2. הקש על "Sign Up" (הירשם)

3. הזן את המידע הנדרש

4. הקש על "Submit" (הגש)


**הערה:** אתה תתבקש לקבוע שאלה סודית לבטיחות נוספת לאחר שתיכנס אל המערכת בפעם הראשונה. ניתן להשתמש כעת בכתובת הדוא"ל והסיסמה שהזנת כנתוני כניסה אל חשבון ה-Eversense DMS ואל כל מוצרי ה-Eversense האחרים.

The screenshot shows the 'Create New Account' page for Eversense. At the top is the Eversense logo and 'Data Management System'. Below that, it says 'English UK' with a dropdown arrow. The main heading is 'Create New Account'. There are three progress indicators. The form fields are: 'First Name \*', 'Last Name \*', 'Email \*' (with 'sample@email.com' entered), 'Create a password \*' (with a list of requirements: 6-32 characters, at least one lower case character, at least one upper case character, at least one number, and at least one special character), and 'Confirm your password \*' (with 'Eg. abc@1A' entered). A 'Next' button is at the bottom right. At the bottom, there is a link 'Have account already? Please go to Sign In' and a copyright notice 'Copyright © 2025 Senseonics® All rights reserved.'

The screenshot shows the login page for Eversense CGM users. The title is 'For the Eversense CGM User'. It features the Eversense logo and 'Data Management System'. Below that, it says 'English UK' with a dropdown arrow. A note states: '\* Use the same email address and password used to log into the Eversense Mobile App.' The form fields are: 'Email \*' (with 'sample@email.com' entered) and 'Password \*'. A 'Sign in' button is highlighted in blue. Below the button, there are links: 'Need an Account? Sign Up', 'Forgot your Password?', and 'Problem logging in? Contact Us'. At the bottom, there is a link 'To sign in to Eversense DMS Pro For Healthcare Professionals click here' and the Senseonics logo.

## היכנס אל המערכת

בכל פעם בה תרצה להשתמש ב-Eversense DMS אתה תצטרך להיכנס אל המערכת.

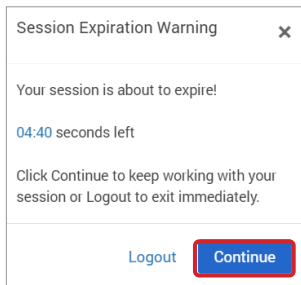

The login page for the Eversense Data Management System. At the top, it says "For the Eversense CGM User". The Eversense logo is displayed, along with "Data Management System" and "English UK" with a dropdown arrow. A note states: "\* Use the same email address and password used to log into the Eversense Mobile App." There are input fields for "Email \*" (containing "sample@email.com") and "Password \*" (with an eye icon for visibility). A "Sign In" button is highlighted with a red border. Below the button are links for "Need an Account? Sign Up", "Forgot your Password?", and "Problem logging in? Contact Us". At the bottom, it says "To sign in to Eversense DMS Pro For Healthcare Professionals click here" and the Senseonics logo.

1. עבור אל [global.eversensedms.com](http://global.eversensedms.com)

2. בעמוד הכניסה אל המערכת, הזן את כתובת הדוא"ל ואת הסיסמה זכור כי שם המשתמש והסיסמה שלך יהיו זהים לאלו שבהם השתמשת כדי להיכנס לאפליקציית Eversense.


3. הקש על "Sign In" (היכנס אל המערכת)

**חשוב:** אם יהיו לך יותר משלושה ניסיונות כושלים להיכנס אל המערכת, חשבון ה-Eversense DMS יינעל למשך 30 דקות.


**הערה:** אם אינך פעיל באתר DMS לפרק זמן של כ-25 דקות, אתה תקבל חלון מוקפץ אשר יורה לך לבחור "Continue" (המשך) אם תרצה להישאר בתוך המערכת.

## שכחת את הסיסמה שלך

אם שכחת את הסיסמה שלך עבור הכניסה אל המערכת, אתה יכול ליצור בקלות סיסמה חדשה.

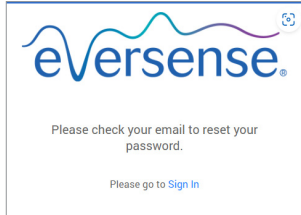


מסר יוצג על מנת ליידע אותך שהודעת דוא"ל נשלחה אליך עם הוראות לאיפוס הסיסמה שלך.

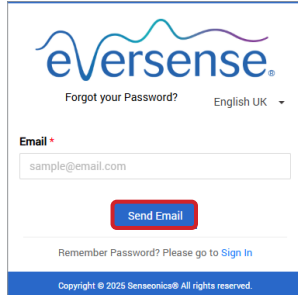


1. הקש על "Forgot your password" (שכחת את הסיסמה שלך) בעמוד הכניסה אל המערכת

2. הזן את כתובת הדוא"ל שלך כאשר תתבקש לעשות זאת

3. הקש על "Send Mail" (שלח הודעת דוא"ל)

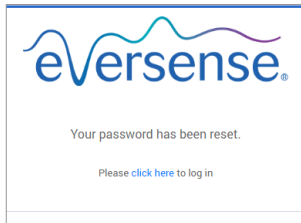

מסר יופיע, המאשר שהסיסמה אופסה. בחר בקישור "click here" (הקש כאן) על מנת לחזור אל עמוד הכניסה אל המערכת.

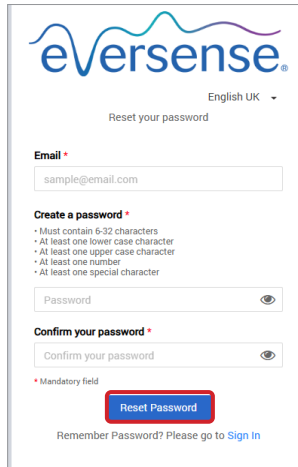

4. פתח את הודעת הדוא"ל והקש על הקישור לאתר

אתה תגיע היישר אל עמוד אינטרנט שבו תיצור ותאשר סיסמה חדשה.

5. הקש על "Reset Password" (אפס סיסמה)

## תמונת מצב Eversense DMS

תמונת המצב של Eversense DMS היא עמוד ברירת המחדל אותו אתה רואה בכל פעם שאתה נכנס אל ה-DMS. עמוד זה מכיל את הפרופיל, תפריט הניווט, זמן נשיאת Eversense, מידע אודות המערכת, בורר טווח תאריכים ודוח פרופיל סוכר אמבולטורי (AGP) שלך.

- בפינה הימנית העליונה של העמוד אתה יכול להיכנס אל מידע ה-Profile (פרופיל) שלך.
- בפינה השמאלית העליונה תוכל לראות Navigation Menu (תפריט גלישה).

The screenshot shows the Eversense DMS dashboard. On the left, a navigation menu is highlighted with a red box. At the top right, the user's profile information is also highlighted with a red box. The main content area displays various metrics and settings.

System Information		Glucose Settings	
Transmitter: 701048	Target	Low: 70 mg/dL	High: 190 mg/dL
Sensor: 7800000000000079	Alert	Low: 85 mg/dL	High: 250 mg/dL
Date Sensor Linked: 07-Aug-2024		Days Since Sensor Linked: 215	



## פרופיל

תכונת הפרופיל מאפשרת לך לשנות את השם או את הסיסמה שלך, לערוך את פרופיל המשתמש שלך או לצאת מתכנת Eversense DMS.

אם תרצה לשנות את הסיסמה שלך עבור הכניסה אל המערכת, אתה יכול לקבוע מחדש בקלות סיסמה חדשה.

### על מנת לשנות את הסיסמה שלך:

#### 1. הקש על שם המשתמש שלך

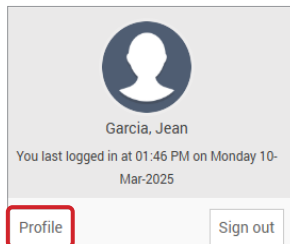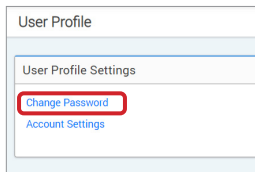

תפריט נשלף יופיע אשר יציג את תמונה הפרופיל שלך, אתה הכניסה האחרונה שלך אל המערכת ואפשרויות לראות/לערוך את הפרופיל שלך או לצאת מן המערכת.

#### 2. הקש על "Profile" (פרופיל) על מנת להיכנס אל הגדרות הפרופיל של המשתמש

#### 3. הקש על "Change Password" (שנה סיסמה) על מנת להציג ולשנות את הסיסמה הנוכחית שלך.

#### 4. הזן את הסיסמה הנוכחית שלך

#### 5. הזן ואשר את הסיסמה החדשה שלך

#### 6. הקש על "Change Password" (שנה סיסמה) על מנת לשמור את השינויים שלך

A screenshot of the 'Change Password' form. It includes a title 'Change Password', a warning message about logging out of the mobile app and disconnecting from third-party services, and a note that changing the password does not disconnect from Eversense DMS Pro. The form has four input fields: 'Current Password', 'New password', 'New password', and 'Confirm new password'. Each field has an eye icon to toggle visibility. Below the fields are two buttons: 'Back to Profile' and 'Change Password'. The 'Change Password' button is highlighted with a red rectangular box.

חשוב: לאחר ששינית את הסיסמה שלך ב-DMS, תצטרך להתנתק מאפליקציית Eversense ולהיכנס חזרה עם הסיסמה החדשה.

על מנת לערוך את הפרופיל שלך:

1. הקש על "Account Settings" (הגדרות חשבון)

2. הזן את המידע אותו תרצה לשנות

אתה יכול לשנות את תמונת הפרופיל שלך על ידי לחיצה על לחצן "Choose File" (בחר קובץ), ובחירה של תמונה מתוך הקבצים על גבי המחשב שלך. תמונת הפרופיל תשונה עבור כל מוצרי Eversense התואמים.

Account Settings

Profile Details

Profile Picture **Choose File** No file chosen

First Name \* Jean

Last Name \* Garcia

Mobile Number \* 1234567890

Date Of Birth \* 07-Oct-2000

Gender \* Female

Diabetes Type Type1

Secret Question \* What is the name of your first pet?

Answer \* ...

Show Answer


3. הקש על "Save" (שמור) על מנת לשמור את השינויים שלך.



עמוד הגדרות הפרופיל של המשתמש יופיע שוב. על מנת לחזור אל תמונת המצב, הקש על "Dashboard" (תמונת מצב) בפינה השמאלית העליונה של תפריט הניווט.

## תפריט גלישה

בפינה השמאלית העליונה של תמונת המצב עם ה-AGP נמצא תפריט הניווט. אתה יכול לפתוח ולסגור את תפריט הניווט על ידי לחיצה על . הקש על כל לחצן בתפריט על מנת לגלוש אל אפשרות זו.

**הערה:** אתה יכול לבחור גם את השפה המועדפת עליך על ידי לחיצה על השפה.

אתה יכול להקיש על סמל  על מנת להרחיב את הבחירה בתפריט הניווט.

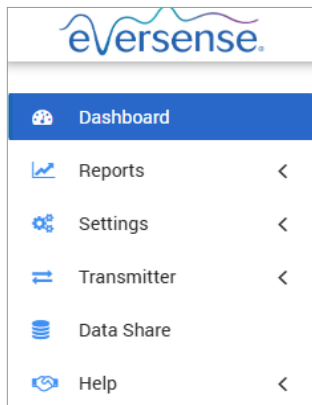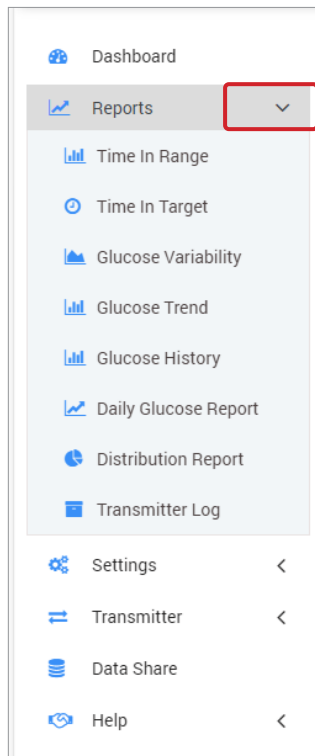

תכונות	בחירות תפריט
חזור אל תמונת המצב	תמונת מצב
<p>הצג, הדפס ושתף דוחות</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• זמן בתוך היעד</li> <li>• זמן בתוך הטווח</li> <li>• השתנות הסוכר</li> <li>• מגמת הסוכר</li> <li>• היסטוריית הסוכר</li> <li>• דוח סוכר יומי</li> <li>• דוח התפלגות</li> <li>• יומן משדר</li> </ul>	דוחות
<p>Eversense DMS הגדרות</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• סוכר</li> <li>• דוח סיכום</li> </ul>	הגדרות
הורד את אפליקציית הלקוח	משדר
קשר את חשבון ה-DMS אל ה-Clinic DMS Pro	שיתוף נתונים
<ul style="list-style-type: none"> <li>• אודות</li> <li>• יצירת קשר</li> <li>• נטרל חשבון</li> <li>• שחרר הערות</li> </ul>	עזרה

## הגדרת טווח תאריכים



בחלק העליון של תמונת המצב, אתה תמצא את האפשרויות שלך לטווח תאריכים מוגדר מראש, וכמו כן את האפשרות לקבוע טווח תאריכים מותאם אישית עבורך. הדבר ישפיע על אילו נתונים יהיו בשימוש עבור ניתוחי נתונים והדרך בה הם מוצגים בתמונת המצב ה-AGP ובכל הדוחות האחרים.

### על מנת לשנות את הגדרות טווח התאריכים שלך:

1. אם תרצה לראות נתונים אשר לא נמצאים בתוך אחד מטווחי התאריכים המוגדרים מראש, הקש על לחצן המכונה "Custom Range" (טווח מותאם אישית) על מנת להציג לוח שנה



הדבר יציג חלון מוקפץ המאפשר לך לבחור בטווח התאריכים המותאם אישית עבורך. **הערה:** נתונים זמינים דרך ה-DMS יהיו בטווח של עד שנה אחת אחורנית.

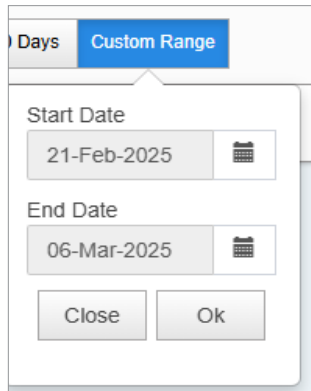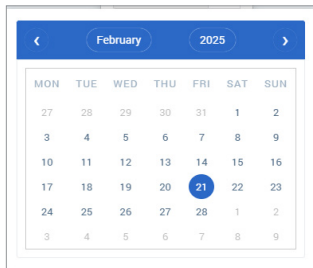

2. בחר **Start Date** (תאריך התחלה) עבור הדיווח הרצוי

3. בחר **End Date** (תאריך סיום) עבור הדיווח הרצוי

4. הקש על "Ok" (אישור) בסיום

## זמן לבישת Eversense ומידע אודות המערכת

### זמן לבישת Eversense

זמן הלבישה הוא אחוז הזמן בו נלבש המשדר החכם, במהלך טווח התאריכים אותו בחרת. 100% מהווים 23.5 שעות של זמן נשיאה של המשדר החכם בכל יום. האחוז אינו כולל זמנים בהם ערך הסוכר איננו מוצג. לדוגמה: ההתחלה של שלב האתחול או כאשר מופעלת התרעה המונעת את הצגת נתוני הסוכר.

🕒 Eversense Wear Time
21.3 %

**מידע אודות המערכת:** חלק ה-'מידע אודות המערכת' ממוקם בחלק התחתון של תמונת המצב AGP.


#### חלק זה מראה לך את:

- Transmitter Serial Number
- Sensor Serial Number
- הגדרות סוכר: את הגדרות הסוכר ניתן לשנות דרך ה-DMS וגם באמצעות אפליקציית Eversense הניידת (ראה *Settings* (הגדרות) למידע נוסף).
- התאריך בו חובר החיישן
- ימים מאז חיבור החיישן

System Information		Glucose Settings	
Transmitter: 701048	Target	Low: 70 mg/dL	High: 180 mg/dL
Sensor: 7600000000000079	Alert	Low: 65 mg/dL	High: 250 mg/dL
Date Sensor Linked: 07-Aug-2024		Days Since Sensor Linked: 215	

# DMS-ב AGP


הדוח הראשוני של תמונת המצב Eversense DMS דוח ה-AGP (פרופיל סוכר אמבולטורי) המציג נתוני סוכר ב-3 חלקים.

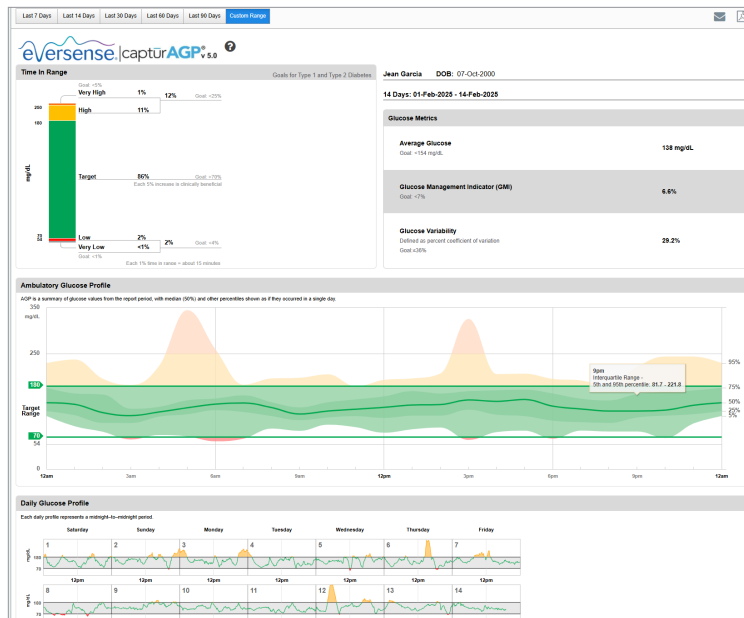

## חלק 1: סטטיסטיקות סוכר ויעדים

**טווחי סוכר ויעדים:** טבלה זו מציגה את הערכים המחושבים שלך בכל טווח סוכר כאחוז מקריאות המכשיר במהלך יום של 24 שעות. ניתן להמיר אחוזים לדקות/שעות בכך שכל 1% זמן בטווח שווה לכ-15 דקות.

- **זמן בתוך היעד:** באופן אידיאלי, ערכי הסוכר נמצאים בטווח המטרה
  - **נמוכים/מאוד נמוכים:** מטרה – מעט ערכים נמוכים או מאוד נמוכים; הפחתה של נמוכים תגרום לך להרגיש טוב יותר
  - **גבוהים/מאוד גבוהים:** מטרה – ללא ערכים גבוהים או מאוד גבוהים; הפחתה של הגבוהים תגרום ל-A1c לרדת במהלך הזמן
- מספר הימים בדוח ותאריכים:** ברירת המחדל של ה-AGP היא 14 הימים האחרונים, אך ניתן לבחור טווח תאריכים מותאם אישית (ראה קביעת טווח התאריכים קודם בחלק זה).
- **סוכר (ממוצע):** כל ערכי הסוכר ביחד, מחולקים למספר הקריאות.
  - **GMI (אינדיקטור ניהול סוכר):** מחושב מתוך הסוכר הממוצע; מעריך את ה-A1c העתידי שלך במעבדה.
  - **השתנות סוכר:** כמה רחוקים (רחבים) ערכי הסוכר הגבוהים והנמוכים ביותר זה מזה; באופן אידיאלי מספר נמוך פחות או שווה ל-36% [מקדם שונות של אחוזים].

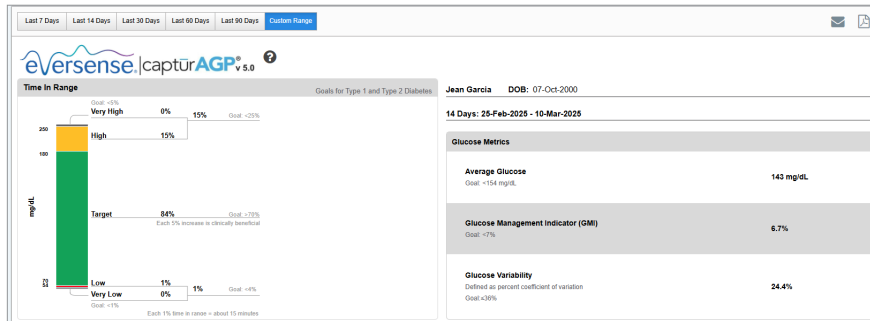


**חלק 2: פרופיל סוכר אמבולטורי:** כל פרופילי הסוכר מטווח התאריכים שנבחר משולבים ליצירת תמונה של יום אחד (24 שעות). באופן אידאלי, הקווים נשארים בתוך **האזור הירוק המודגש** (טווח המטרה).


**קו כבד:** קו תיכוני (אמצעי) היכן שחצי מערכי הסוכר נמצאים מעל וחצי נמצאים מתחת; באופן אידאלי, הקו הוא בעיקר שטוח ונמצא בתוך אזור טווח המטרה הירוק של 70 עד 180 מ"ג/ד"ל.

**צל כהה יותר:** האזור בעל הצל הכהה יותר מראה 50% מערכי הסוכר; באופן אידאלי, השטח ביניהם הוא צר

**צל בהיר יותר:** 5% מן הערכים הם מעל (95% קו עליון) ו-5% הם מתחת (5% קו תחתון); באופן אידאלי, ככל שהקווים בעלי הצל הבהיר יותר קרובים יותר אל האזור בעל הצל הכהה, כך טוב יותר

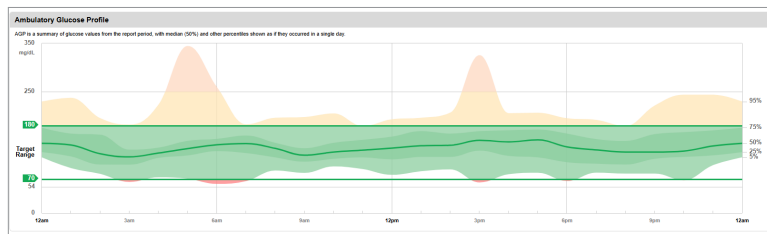

**חלק 3: פרופילי סוכר יומיים:** כל תיבה מייצגת תבנית סוכר של יממה אחת. הן תוצגנה רק אם טווח התאריכים שלך נקבע ל-14 ימים או פחות.

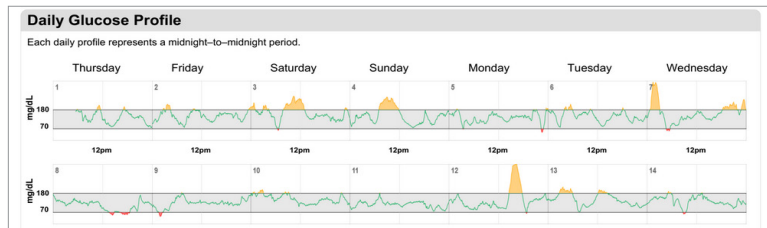

מקור: <http://www.agpreport.org/agp/agpreports>




## דוחות נוספים

תכונת מפתח של אפליקציית Eversense DMS היא היכולת ליצור, להדפיס ולשתף דוחות מפורטים אודות היסטוריית הסוכר שלך. הדוחות מספקים דרכים מגוונות לארגן ולראות את קריאות הסוכר שלך מדקה לדקה, יום ליום, או במהלך טווח של כמה שבועות או חודשים.

**הערה:** אם אתה בוחר בדוח מסוים ואין נתונים אשר מוצגים, בדוק שנתוני הסוכר הועלו קודם לכן עבור טווח התאריכים הנבחר. אם עדיין לא מוצגים, צור קשר עם מחלקת שירות לקוחות.

## סן, הדפס או שלח בדוא"ל את הדברים המוצגים בדוחות

בפינה הימנית העליונה של עמודי הדוח יישן אפשרויות עבור שינוי של העדפות הדוח, הדפסה של הדוח ושליחה שלו בדוא"ל.

			הקש
שמור דוח PDF-כ	שלח דוח בדוא"ל	שנה מסנני דוח	על מנת
איך	<p>עקוב אחר החלון המוקפץ המבקש ממך לשלוח דוח הניתן להדפסה לנמען נבחר.</p> <div data-bbox="306 628 651 857"> <p>Send Report to Email <span>x</span></p> <p>To: <input type="text"/></p> <p>Subject: <input type="text" value="Glucose Variability for Jean Garcia from 09-Feb-2025 to 10-Mar-2025"/></p> <p>Attached: <a href="#">GlucoseVariability.pdf</a></p> <p>Message: <input type="text" value="Glucose Variability for Jean Garcia from 09-Feb-2025 to 10-Mar-2025"/></p> <p><input type="button" value="Send"/></p> </div>	<p>בצע בחירות על מנת לבחור אילו סוגי אירועים, ימים של השבוע ואפשרויות אחרות תופענה בדוחות, כאשר ישימות. מסנן זה איננו זמין עבור דוחות ה-AGP, זמן בתוך הטווח על פי זמן היום, או דוח סוכר יומי.</p> <div data-bbox="676 729 1057 938"> <p>Report Preferences <span>x</span></p> <p><input checked="" type="button" value="Filter Types"/> <input type="button" value="Days of the Week"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sensor Glucose</p> <p><input type="checkbox"/> Blood Glucose</p> <p><input type="checkbox"/> Insulin</p> <p><input type="checkbox"/> Meal</p> <p><input type="checkbox"/> Exercise</p> <p><input type="checkbox"/> Health</p> <p><input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Save"/></p> </div>	
<p>לחץ על הסמל על מנת להפוך את הדוח שלך לקובץ PDF המאפשר לך להדפיס את הדוח בבית.</p>			

## זמן בתוך היעד


דוח ה-'זמן בתוך היעד' מציג גרף עוגה המנתח את אחוז הזמן בו נתוני הסוכר שלך נמצאים מתחת, בתוך או מעל טווח היעד אותו קבעת בגדרות הסוכר שלך.

### הצגת הדוח:

הטריז הירוק מייצג את אחוז הזמן בו היית בתוך טווח המטרה שלך.

הטריז האפור מייצג את אחוז הזמן בו היית מעל טווח המטרה שלך.

הטריז האדום מייצג את אחוז הזמן בו היית מתחת טווח המטרה שלך.

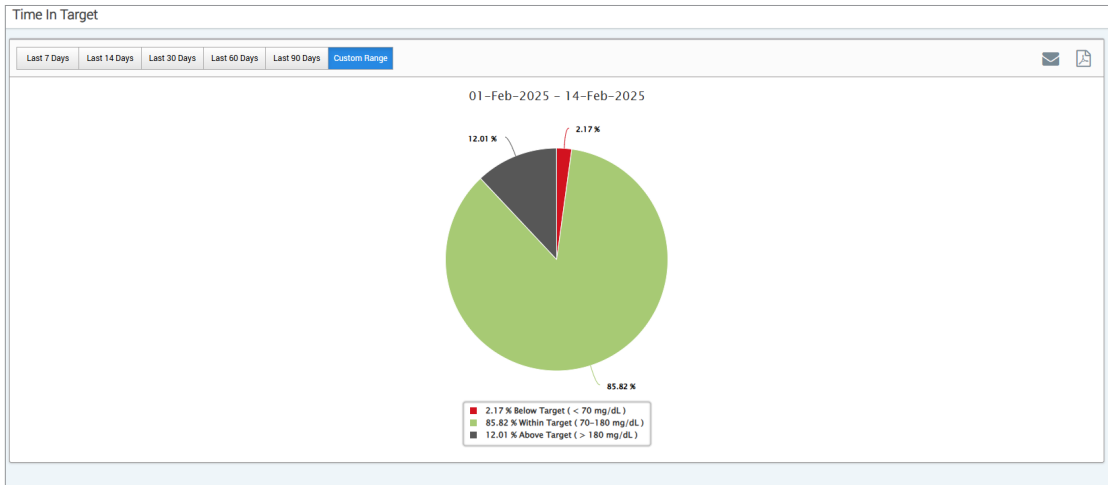

## זמן בתוך הטווח

### זמן בתוך הטווח על פי זמן היום


דוח ה-'זמן בתוך הטווח על פי זמן היום' מראה סט של גרפים הבוחנים את אחוז הזמן בו הסוכר שלך היה בתוך טווחי הסוכר אשר נקבעו מראש.

- מאוד נמוך:  $> 54$  מ"ג/ד"ל
- נמוך: 54 - 70 מ"ג/ד"ל
- בתוך הטווח: 70 - 180 מ"ג/ד"ל
- גבוה: 180 - 250 מ"ג/ד"ל
- מאוד גבוה:  $< 250$  מ"ג/ד"ל

### לדוח זה יש שני חלקים:

#### זמן בתוך הטווח


חלק זה מציג את אחוז הזמן הכולל שלך בו הסוכר שלך היה בתוך טווחי הסוכר אשר נקבעו מראש, על בסיס טווח התאריכים אותו בחרת.

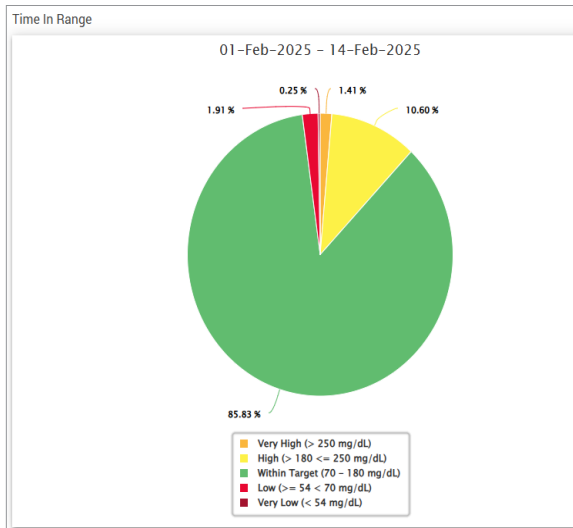

## זמן בתוך הטווח על פי זמן היום

חלק זה של הדוח מציג את תרשים 'זמן בתוך הטווח' הכללי אל חלקים שונים במהלך היום. אתה יכול לראות את הנתונים שלך בחלקים של 4 שעות, 6 שעות או 8 שעות. ניתן לבצע התאמה זו על ידי בחירה בחלק הימני העליון של הדוח.

כל חלק מראה את אחוז הזמן בו ערכי הסוכר שלך היו בתוך אותם חלקים של מאוד נמוך, נמוך, בתוך הטווח, גבוה ומאוד גבוה.

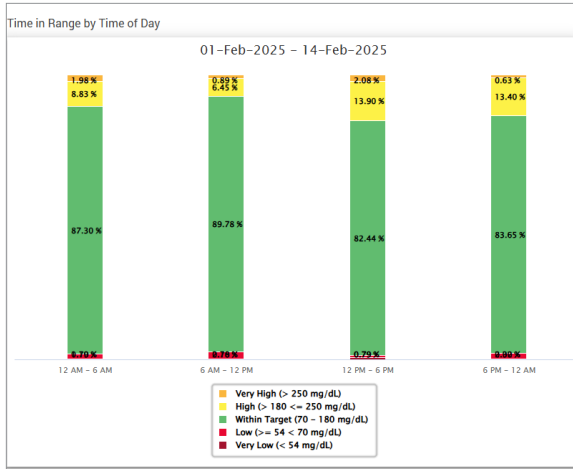


## דוח נטיית השינוי של הסוכר

### דוח נטיית השינוי של הסוכר מציג מידע בשתי דרכים שונות:

#### גרף מגמת הסוכר:

- מציג סיכומי קריאות סוכר לפרק זמן של 24 שעות.
- כולל מספר רב של ימים המופיעים על גבי אותו הגרף.
- מראה את קריאת הסוכר המקסימלית, המינימלית והממוצעת עבור כל שעה.
- מספק תמונות חזותיות של שינויים ברמות הסוכר היומיות שלך.

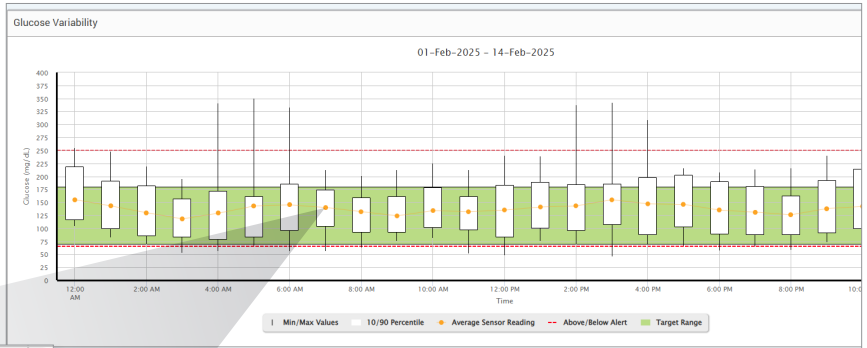

From 07:00 AM to 08:00 AM  
Average: 134 mg/dL  
Min: 73 mg/dL  
Max: 226 mg/dL  
10th Percentile: 89 mg/dL  
90th Percentile: 179 mg/dL

**הערה:** הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן ממוצעת מסוימת על מנת לראות פרטים על הקריאות במהלך אותה השעה.

## הטבלה:

- מארגנת נתוני סוכר על פי מרווחים של 4 שעות.
- מספקת ניתוח סטטיסטי מפורט עבור כל מרווח זמן.
- כוללת אחוזי קריאות הנמצאות בתוך, מעל ומתחת לטווח יעד הסוכר.
- מספקת מיון של שימוש באינסולין ופחמימות אשר הזנוו עבור אותם מרווחי זמן.

GLUCOSE	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-00:00	TOTAL
% Below Low Alert	1 %	2 %	1 %	2 %	2 %	1 %	1 %
% Above High Alert	3 %	-	1 %	2 %	2 %	-	1 %
Number of Values Below Low Alert	8	10	6	11	16	5	56
Number of Values Above High Alert	21	-	8	12	16	-	66
% Within Target	81 %	86 %	81 %	89 %	88 %	90 %	86 %
% Below Target	2 %	2 %	1 %	2 %	6 %	1 %	2 %
% Above Target	17 %	12 %	18 %	9 %	8 %	9 %	12 %
Average Glucose	149 mg/dL	135 mg/dL	147 mg/dL	130 mg/dL	138 mg/dL	134 mg/dL	139 mg/dL
Lowest Glucose	46 mg/dL	57 mg/dL	60 mg/dL	53 mg/dL	56 mg/dL	48 mg/dL	46 mg/dL
Highest Glucose	342 mg/dL	226 mg/dL	261 mg/dL	346 mg/dL	350 mg/dL	240 mg/dL	350 mg/dL
Standard Deviation	46.4 mg/dL	35.8 mg/dL	40.9 mg/dL	41.9 mg/dL	39.8 mg/dL	32.9 mg/dL	40.4 mg/dL
Number of Values in the 10-90 Percentile	504	627	539	545	540	545	3,189
Total Number of Glucose Values	624	654	672	672	672	672	3,966
Number of Days with at least One Value	13	14	14	14	14	14	14
Average Number of values per Day	48	47	48	48	48	48	283

**הערה:** אם יש לך בעיות בהגת הדוח, נסה להגביל את טווח התאריכים שלך. בדרך כלל כמויות גדולות של נתונים לא תאפשרנה את תפקודו של הדוח.

## הרצת הדוח

### 1. בחר **Reports > Glucose Variability** (דוחות < נטיית השינוי של הסוכר)

טווח התאריכים המוצג יהיה השבוע האחרון בו הזנוו או הועלו נתונים.

### 2. בחר את טווח התאריכים

**הערה:** על מנת לשנות את טווח התאריכים עבור הדוח, עקוב אחר הוראות **Setting Date Range** (קביעת טווח תאריכים) שניתנו קודם בחלק **Dashboard** (תמונת מצב) במדריך זה למשתמש.

## דוח מגמת הסוכר

### דוח מגמת הסוכר:

- מציג קריאות סוכר פרטניות לפרק זמן של 24 שעות.
- מציג מספר רב של ימים המופיעים על גבי אותו הגרף.
- מספק דרך קלה לזהות את נטיית השינוי במהלך ימות השבוע.



### הרצת הדוח

1. בחר **Glucose Trend > Reports > (דוחות < מגמת סוכר)**

2. בחר את טווח התאריכים

## הצגת הדוח

נקודות נתונים על גבי הדוח מקודדות צבעים כאשר כל יום בשבוע מוצג בצבע אחר. אתה יכול להשתמש במסנני הדוח על מנת לבחור את היום/ימים אותם תרצה להציג על הגרף.

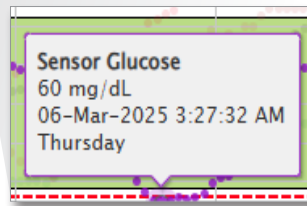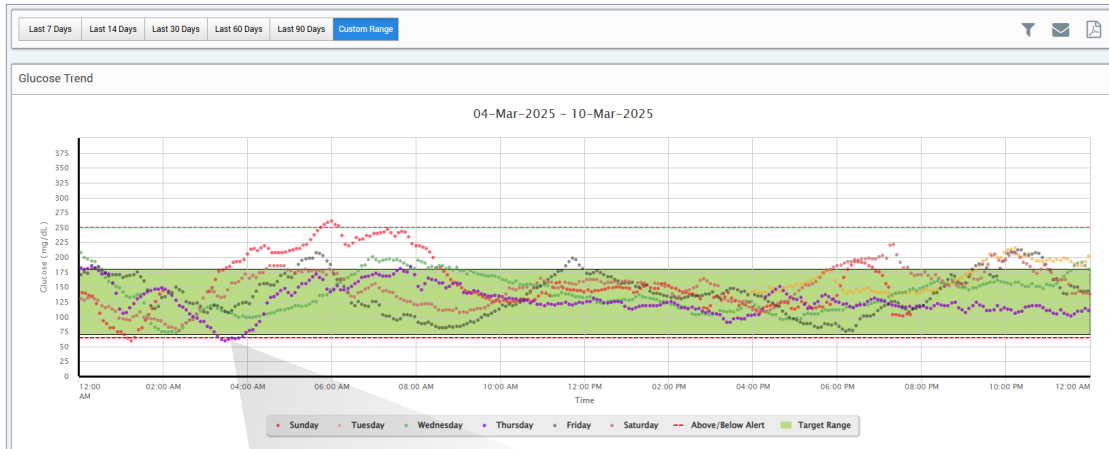

**הערה:** הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן מסוימת על מנת לראות פרטים על אותה הקריאה.

## דוח היסטוריית הסוכר

דוח היסטוריית הסוכר מציג CGM היסטוריים ונתונים אשר הוזנו באופן ידני בצורה של גרף מגמה. דוח היסטוריית הסוכר מספק דרך יעילה לעקוב אחר קריאות סוכר החיישן ואחר הכיולים.


### הרצת הדוח

**1. בחר Reports > Glucose History Report**  
(דוחות < דוח היסטוריית הסוכר)

**2. בחר את טווח התאריכים**

## הצגת הדוח

כל נקודת נתונים מהווה קריאת סוכר חיישן בודדת. האירועים שתועדו באפליקציה הניידת מוצגים בדוח בזמן שבו הם תועדו. אם תבחר טווח נתונים של יותר מ-30 ימים, אירועים כגון ארוחות, אינסולין וכו', לא יוצגו.

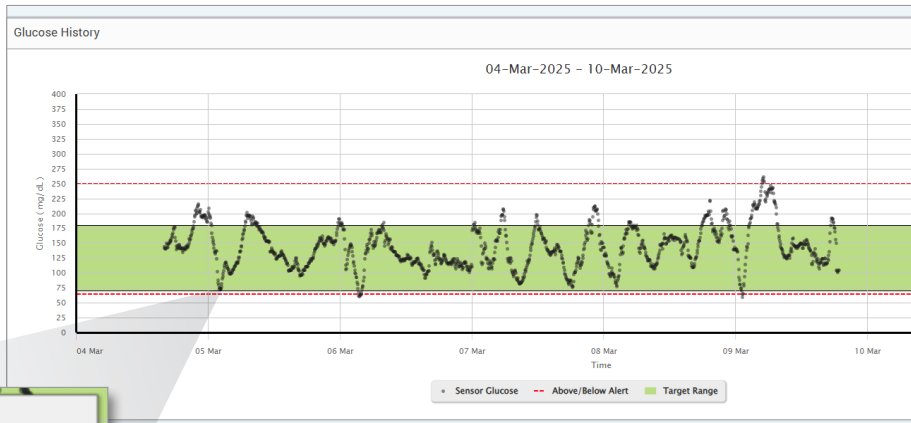

Sensor Glucose  
74 mg/dL  
05-Mar-2025 02:12:32 AM

**הערה:** הנח את הסמן שלך מעל לקריאת סוכר חיישן מסוימת על מנת לראות פרטים על אותה הקריאה. אתה יכול גם להניח את הסמן מעל לסמל אירוע על מנת לראות פרטים לגבי אותו האירוע.

## דוח סוכר יומי

דוח סוכר יומי מציג קריאות סוכר לאורך תקופה של 24 שעות, מספר ימים ברצף.

### דוח הסוכר היומי:

- בעל טווח יעד קבוע של סוכר של 70-180 מ"ג/ד"ל.
- מציג רמות התרעה גבוהות ונמוכות של סוכר (קווים אדומים) אותן הגדרת במערכת ה-CGM שלך.
- מציג נתונים סטטיסטיים מרכזיים עבור כל יום בהתבסס על יעדי הסוכר והגדרות ההתרעה.
- כולל אפשרות להציג סמלי אירועים בגרף המגמה, ולהרחיב טבלת אירועים עבור כל יום.


### הרצת הדוח

1. בחר **Reports > Daily Glucose Reports**  
(דוחות < דוחות סוכר יומיים)

2. בחר את טווח התאריכים

## הצגת הדוח

דוח הסוכר היומי מציג ימים מרובים ברצף עבור טווח התאריכים שבבחר, ומספק דרך לזהות דפוסי סוכר לאורך מספר ימים. הנתונים הסטטיסטיים של כל יום מופיעים מימין לגרף המגמה ומבוססים על טווח יעד הסוכר הסטנדרטיים של 70-180 מ"ג/ד"ל ורמות ההתערות הגבוהות והתערות הסוכר שנקבעו על ידך. כדי לסקור מידע נוסף על ה-CGM עבור כל יום (התראות, כוילים, אירועים שהזנת לאפליקציית CGM), תוכל להפעיל את הצגת סמלי האירועים בגרף המגמה ולהרחיב את טבלת האירועים מתחת לגרף המגמה כדי להציג מידע נוסף. כאשר מורחבת, טבלת האירועים מפרטת מידע במרווחים של 4 שעות אשר מיושרים עם מקטעי 4 השעות בתרשים המגמה.

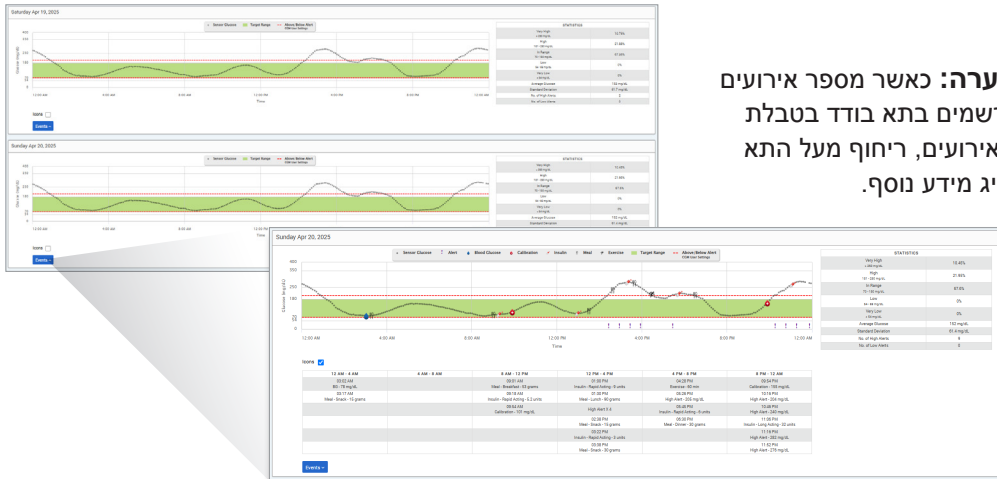

**הערה:** כאשר מספר אירועים נרשמים בתא בודד בטבלת האירועים, ריחוף מעל התא יציג מידע נוסף.

## דוח התפלגות הסוכר

### דוח התפלגות הסוכר:

- מארגן את נתוני הסוכר שלך בהתאם ליעדי הסוכר שלך ולטווחי ההתרעות ומציג את הנתונים בצורה של גרף עוגה.
- מציג גרפי עוגה נפרדים עבור התקופה הנוכחית ועבור תקופות קודמות.
- טווח היעד מוגדרים תחת הגדרות הסוכר.
- מספק בדיקה חזותית עבור מספר הקריאות שהיו בטווח היעד במהלך טווח שנבחר מראש ואת השינוי לאורך הזמן.


### הרצת הדוח

**1.1** **Reports > Glucose Distribution Report** בחר  
(דוחות < דוח התפלגות הסוכר)

**2.2** בחר את טווח התאריכים

## הצגת הדוח

דוח התפלגות הסוכר יציג שני גרפי עוגה על בסיס טווח התאריכים אותו תבחר מראש. הוא יראה את הנתונים הנוכחיים והנתונים הקודמים עבור טווח התאריכים הנבחר. נתונים אלו מאפשרים לך לבצע השוואה של שינויי הווה ועבר כחלק מן הניהול שלך.

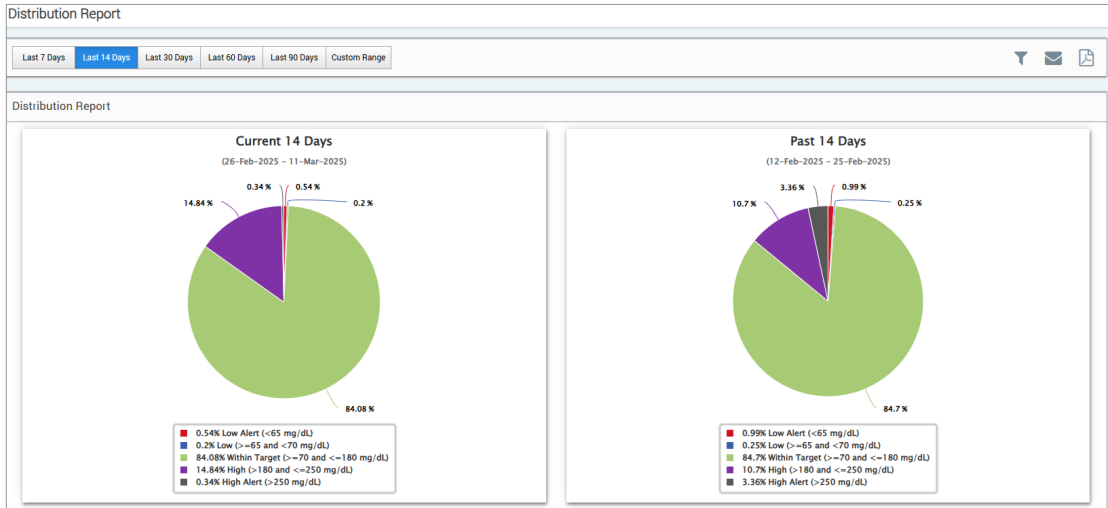

## דוח יומן משדר

דוח יומן המשדר מספר סקירה מקיפה של הנתונים בתוך טווח התאריכים הנבחר.

### דוח יומן המשדר מציג שלוש טבלאות נפרדות:

- **Blood Glucose: (סוכר בדם)** טבלה זו מציגה רשימה של כל קריאות הסוכר בדם שהוזנו ידנית ואירועים קשורים בסדר כרונולוגי.
- **Event Entries: (הזנות אירועים)** טבלה זו מציגה אירועי מטופל אשר הוזנו באמצעות אפליקציית Eversense הניידת.
- **Sensor Glucose: (סוכר חיישן)** טבלה זו מציגה ערכי סוכר אשר נקראו על ידי החיישן.

## הרצת הדוח

1. בחר **Reports > Transmitter Log**

(דוחות < יומן משדר)




2. בחר את טווח התאריכים




## הצגת הדוח

האירועים מוצגים עם מידע בנוגע לתאריך, השעה ו-:

- **Blood Glucose: (סוכר בדם)** ערך סוכר, יחידה, כיול
  - **Event Entries: (הזנות אירועים)** סוג האירוע, תת סוג האירוע, ערך
  - **Sensor Glucose: (סוכר חיישן)** ערך סוכר, יחידה, מזהה חיישן
- ניתן למיין את האירועים בסדר עולה או בסדר יורד על ידי לחיצה על ראש העמודה. מספר הרשומות מצוין בסופו של כל יומן.

DATE	TIME	BLOOD GLUCOSE	UNIT	CALIBRATION
04-Jun-2024	04:25 PM	100	mg/dL	●
04-Jun-2024	02:07 PM	100	mg/dL	●
03-Jun-2024	12:51 PM	160	mg/dL	●
03-Jun-2024	12:41 PM	166	mg/dL	●
03-Jun-2024	11:33 AM	100	mg/dL	●
31-May-2024	01:41 PM	99	mg/dL	●
31-May-2024	12:42 AM	100	mg/dL	●
31-May-2024	12:35 AM	112	mg/dL	●
30-May-2024	11:30 PM	124	mg/dL	●
30-May-2024	10:13 PM	100	mg/dL	●

סמל מתחת לעמודה "Calibration" (כיוול) בטבלת ה-'סוכר בדם' יציין האם ערך הסוכר  שימש לכיוול,  לא שימש, או  היה ידני.

- **Used** (שימש) ערך סוכר בדם אשר אותו הזנת כערך כיוול והוא התקבל על ידי המערכת. 
- **Not used** (לא שימש) ערך כיוול אותו הזנת הנמצא מעל ל-400 מ"ג/ד"ל או מתחת ל-40 מ"ג/ד"ל. 
- **Manual** (ידני) אירוע סוכר בדם אשר לא הוזן כערך כיוול. 

בחירה של "Device History" (היסטוריית מכשיר) תראה מתי החיישן הוחדר, כמו גם את תאריך תחילת הכיוול.

## ייצוא של נתונים

מעמוד 'דוח יומן המשדר', אתה יכול גם לייצא נתונים בפורמת .xlsx.

Transmitter Log

Last 7 Days Last 14 Days Last 30 Days **Last 60 Days** Last 90 Days Custom Range

Device History Export all

1. בחר **Reports > Transmitter Log** (דוחות < יומן משדר)

2. בחר "Export all" (ייצא הכל) בחלק העליון של העמוד על מנת לייצא את כל נתוני יומן המשדר כ-.xlsx (גיליון Excel)

# Settings (הגדרות)

## סוכר

הגדרות הסוכר מאפשרות לך להתאים אישית את רמות היעד וההתרעה עבור הסוכר שלך. הגדרות אלו משפיעות על הצורה בה הסוכר ונתוני אירועים אחרים מאורגנים ומוצגים בדוחות. כאשר אתה מסנכרן באופן אלחוטי את הנתונים שלך באמצעות תכונת 'שתף את הנתונים שלי' באפליקציה הניידת, הגדרות הסוכר אותן שמרת באפליקציה תסונכרנה גם הן אל חשבון ה-DMS שלך.

## הערה:

- לא יתבצע סנכרון של הגדרות הסוכר כאשר הנתונים מועלים מן המשדר החכם באמצעות כבל ה-USB עם אפליקציית הלקוח של Eversense.
- שינוי ההגדרות בתוך ה-DMS לא ישנה את ההגדרות אותן הזנת באפליקציית Eversense הניידת. אתה יכול לשנות את ההגדרות עבור מערכת ה-Eversense CGM שלך היישר על גבי אפליקציית Eversense CGM הניידת.

### Glucose Settings

Unit Of Measure  mg/dL  mmol/L

Target Range (must be between Alert Settings)

High Target*	-	180	+
Low Target*	-	70	+

Alert Range (must be between 55 and 350 mg/dL)

High Alert*	-	250	+
Low Alert*	-	64	+

Note:  
Eversense E3: Low Alert can be set as low as 60 mg/dL  
Eversense 365: Low Alert can be set as low as 55 mg/dL

Cancel Save

## על מנת לשנות את ההגדרות בתוך חשבון ה-Eversense DMS שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. בחר **Settings > Glucose** (הגדרות < סוכר)
  2. הקש על לחצן **מ"ג/ד"ל** או **ממו"ל/ל** מתחת ל-'יחידות המידה' על מנת לבחור את יחידת המידה בה אתה רוצה שנתוני הסוכר יוצגו.  
אם אתה משנה את יחידת המידה, ערכי טווח הסוכר וערכי טווח ההתרעות ישתנו בהתאם.
  3. הקש על לחצני **+/-** בצד הימני של ה-'יעד הגבוה' וה-'יעד הנמוך' על מנת להציג ולשנות את הגבול הגבוה והגבול הנמוך של טווח היעד של הסוכר שלך.
  4. **חזור על שלב זה עבור טווח ההתרעה של הסוכר**
  5. כאשר סיימת לבצע את השינויים, הקש על **"Save"** (שמור) על מנת לשמור את השינויים שלך
- הערה:** הגדרות Eversense DMS לא תשפיענה על הגדרות מערכת ה-Eversense CGM והן תשפיענה רק על האופן בו הנתונים מאורגנים ומוצגים בתצוגת Eversense DMS.

הגדרות דוח סיכום מאפשרות לך לקבוע דוח אוטומטי מתוכנן באופן סדיר אשר יישלח אליך בדוא"ל. אתה יכול לבחור את הדרך בה תקבל את הדוחות ואלו דוחות תרצה לקבל.

### הערה:

- אתה תקבל את הדוחות כקובצי PDF מצורפים אל הודעת דוא"ל.
- כתובת הדוא"ל אליה תקבל את הדוחות היא כתובת הדוא"ל בה עשית שימוש ליצור את חשבון ה-Eversense שלך.

על מנת לשנות את ההגדרות בתוך חשבון ה-Eversense DMS שלך, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. בחר **Settings > Report Summary** (הגדרות < דוח סיכום)
2. לחץ על התיבה ליד **"Yes, I would like to receive reports"** ("כן, אני רוצה לקבל דוחות") כך שניתן יהיה לראות את הסימון
3. בחר באיזו תדירות תרצה לקבל את הדוחות אל כתובת הדוא"ל שלך
  - **Once a week**: (פעם בשבוע) אתה תקבל את הדוח בכל יום ראשון. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישה בשבוע הקודם.
  - **Every Other Week**: (פעם בשבועיים) אתה תקבל את הדוח ביום ראשון פעם בשבועיים. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישה בשבועיים הקודמים.
  - **Once a Month**: (פעם בחודש) אתה תקבל את הדוח ביום הראשון בכל חודש. הדוחות יציגו את הנתונים אותם מערכת ה-Eversense CGM שלך חישה בחודש הקודם.

#### 4. בחר את השפה בה תרצה שהדוחות יוצגו

#### 5. בחר אלו דוחות תרצה לקבל

#### הערה:

- אם תבחר את דוח הזמן בתוך המטרה, אתה תהיה חייב גם לבחור את הגדרת השעה ביום. למידע נוסף אודות דוח זמן בתוך הטווח על פי זמן היום, ראה *Reports (דוחות)*.
- דוח הסוכר היומי אינו בחירה זמינה עבור סיכום הדוח.

#### 6. לחץ על "Save" (שמור)

לאחר שהגדרה נשמרה, אתה תקבל את הודעת הדוא"ל הראשונה שלך ביום הראשון של המחזור הבא. אם תבחר בפעם בשבוע או פעם בשבועיים, אתה תקבל את הדוח הראשון שלך ביום ראשון העוקב לכך. אם תבחר בפעם בחודש, אתה תקבל את הדוח הראשון שלך ביום הראשון של החודש הבא.

### על מנת להפסיק לקבל דוח סיכום בהודעות דוא"ל:

#### 1. בחר **Settings > Report Summary** (הגדרות < דוח סיכום)

2. לחץ על התיבה ליד **"Yes, I would like to receive reports"** ("כן, אני רוצה לקבל דוחות") כך שלא יהיה סימון בתוך התיבה

#### 3. לחץ על "Save" (שמור) בחלק התחתון של העמוד

**הערה:** אם לא ביצעת סנכרון של הנתונים שלך אל חשבון ה-Eversense שלך מתוך מערכת ה-Eversense CGM שלך במהלך תקופת דוח אחת, אתה תקבל הודעת דוא"ל האומרת לך שלא תקבל יותר הודעות דוא"ל עד אשר לא תבצע את סנכרון הנתונים אל החשבון שלך.

## העלאת נתוני מכשיר

קיימות שתי דרכים בהן ניתן להעלות נתוני מכשיר אל חשבון ה-Eversense DMS שלך.

**1.** אם פונקציית **Auto Sync (סנכרון אוטומטי)** מופעלת באפליקציית Eversense שלך, נתוני ה-CGM שלך יועלו באופן אוטומטי אל חשבון ה-DMS שלך בכל 5 דקות.

**עצה:** חיבור אלחוטי לאינטרנט מן המכשיר הנייד שלך נחוץ על מנת לסנכרן את הנתונים שלך באמצעות אפליקציית Eversense הניידת.




**הערה:** אתה יכול להעלות את הנתונים באופן ידני על ידי שימוש בתכונת "**שתף את הנתונים שלי**" באפליקציית Eversense הניידת ועל ידי לחיצה על "**התחל סנכרון**" על מנת להעלות באופן אלחוטי את נתוני ה-CGM שלך אל חשבון ה-DMS שלך.

**2.** אתה יכול גם להעלות נתונים מן המשדר החכם דרך כבל USB הניתן ביחד עם מערכת ה-Eversense CGM שלך. על מנת להעלות את נתוני המשדר החכם באמצעות כבל USB, עליך להוריד ולהתקין תחילה את אפליקציית הלקוח של Eversense.

**הערה:** במהלך תהליך ההעלאה, המשדר החכם שלך לא יאסוף נתונים מן החיישן.

# על מנת להוריד ולהתקין את אפליקציית הלקוח של Eversense:

1. בחר Transmitter (משדר) מתפריט הניווט

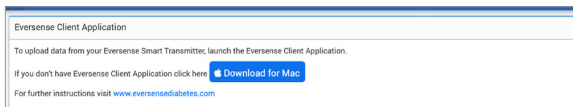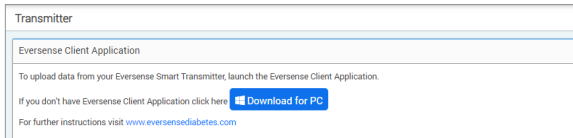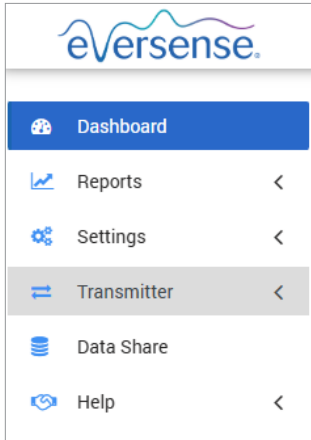

2. לחץ על **Download for PC** (הורדה עבור מחשב) או **Download for Mac** (הורדה עבור Mac)

הלחצן המתאים יוצג בהתאם למערכת המחשב בה אתה עושה שימוש.


**הערה:** לאחר ההורדה מוצלחת, אתה עלול לראות אזהרה מן הדפדפן שלך האומרת שהתקנת התכנה איננה מורדת בדרך כלל ושהיא עלולה להיות מסוכנת. Eversense DMS אינה מכילה תכנות זדוניות או וירוסים אשר עלולים להזיק למחשב שלך.

## על מנת להוריד את אפליקציית הלקוח של Eversense עבור משתמשי מחשב


### 1. הרץ את תכנת ההתקנה

אתה יכול גם להקיש על "Save" (שמור) על מנת לשמור את התכנה במחשב שלך ולהתקין אותה במועד מאוחר יותר. כאשר אתה מריץ את התכנה, עקוב אחר החלונות המוקפצים המגיעים מאשף InstallShield.

### עבור משתמשי Chrome:

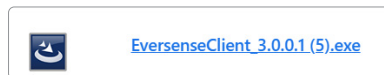


### עבור משתמשי דפדפנים אחרים:

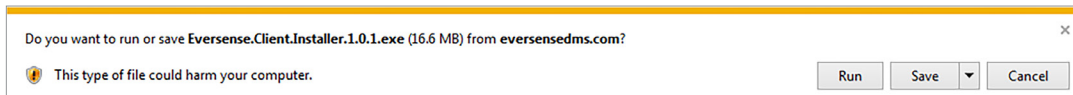


**הערה:** אפליקציית הלקוח של Eversense מורדת היישר מתוך Eversense DMS. יכול להיות שיופיע חלון קופץ אשר ישאל אותך אם תרצה להתקין אפליקציה זו בגלל שהיא איננה מורדת מחנות Microsoft. אנא לחץ על "Run Anyway" (הרץ בכל מקרה) בכדי להמשיך את ההתקנה.


## 2. הקישו דרך אפשרויות ברירת המחדל על מנת להתקין את התכנה

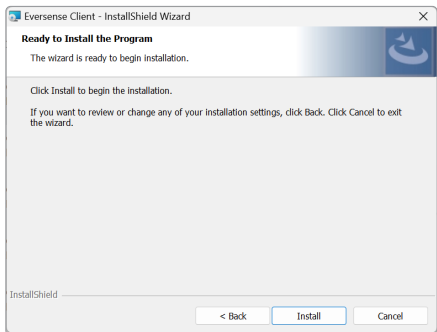


ד.

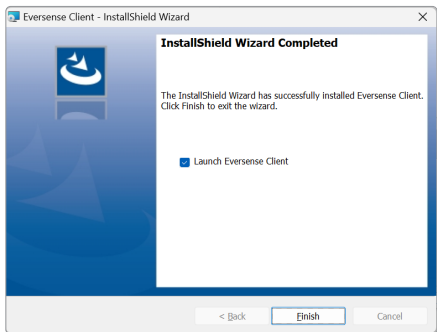


ה.

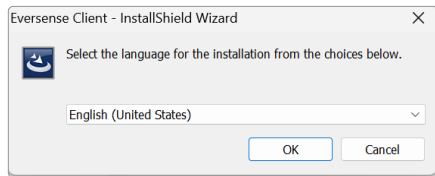

א.

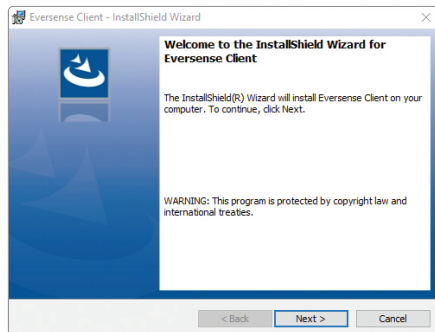


ב.

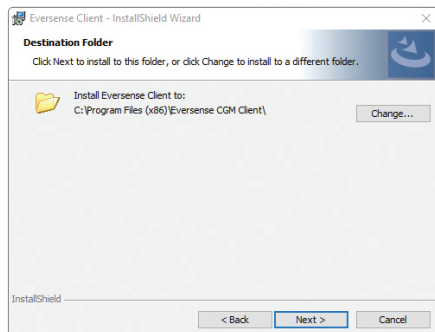

ג.

## על מנת להוריד את אפליקציית הלקוח של Eversense עבור משתמשי Mac:

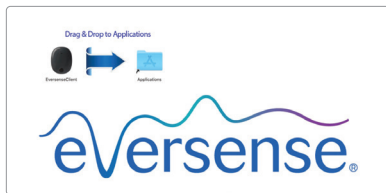


1. הרץ את תכנת ההתקנה

2. גרור ושחרר את אייקון לקוח Eversense אל תיקיית האפליקציה על גבי המסך

3. פתח את אפליקציית הלקוח של

Eversense בתוך תיקיית האפליקציות של ה-Mac שלך.

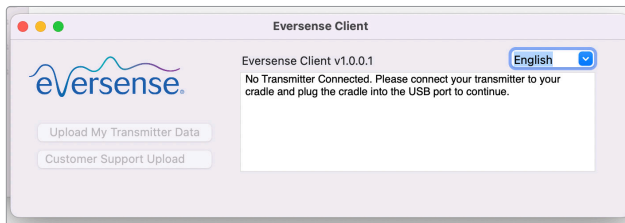

חשוב: אפליקציית הלקוח של EVERSENSE מורדת היישר מתוך EVERSENSE DMS. כאשר תרצה לפתוח את האפליקציה, יכול להיות שיופיע חלון קופץ שאומר ש-APPLE איננה יכולה לפתוח אפליקציה זו. אפליקציית הלקוח של EVERSENSE איננה מכילה תוכנות זדוניות.


על מנת לפתוח את האפליקציה, עליך:

1. לעבור אל **System Preferences > Security and Privacy** (העדפות מערכת < ביטחון ופרטיות)

2. ללחוץ על **“Open Anyway”** (פתח בכל מקרה) ליד **“Eversense Client was blocked from use because it is not from an identified developer”** (אפליקציית הלקוחות Eversense נחסמה בגלל שהיא איננה מגיעה ממפתח מוכר)


3. ללחוץ על **“Open”** (פתח) בחלון הקופץ הבא

## על מנת להעלות את נתוני המשדר החכם אל חשבון ה-DMS שלך:

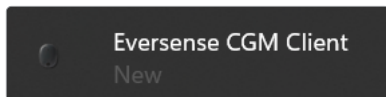


1. פתח את אפליקציית הלקוח Eversense על ידי פתיחה של "Start menu" (תפריט חכם) על גבי המחשב שלך וחפש תוכניות "Recently Added" (נוספו לאחרונה), או באמצעות חיפוש אחר "Eversense".

2. פתח לפתוח את תיקיית "Eversense CGM Client" (לקוח Eversense CGM)

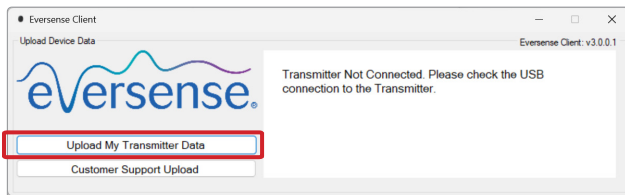



3. הקש על "Upload My Transmitter Data" (העלה את נתוני המשדר החכם שלי) ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל בה השתמשת על מנת ליצור את החשבון ואת הסיסמה

חבר את המשדר החכם שלך אל המחשב שלך באמצעות כבל ה-USB.


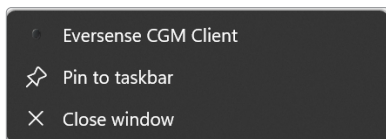


**עצה:** על מנת שמשמשי המחשב יפתחו את התכנה במהירות על ידי שימוש במערכות הפעלה של Windows, לחץ לחיצה ימנית על Eversense Client icon (מל לקוח Eversense) והצמד אותו אל ה-Taskbar (רוגל המשימות) או אל תפריט Start (התחלה).

#### 4. כאשר תתבקש לעשות זאת, הקש על "Upload" (העלה) על מנת להתחיל להעלות את נתוני המשדר החכם שלך אל החשבון שלך

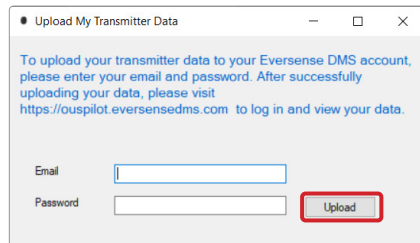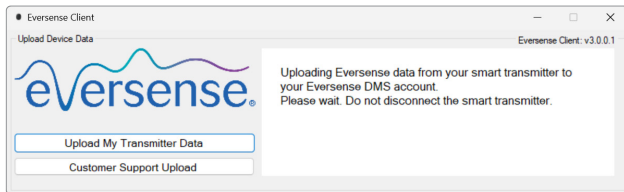


#### 5. הקש על "OK" (אישור) על מנת להשלים

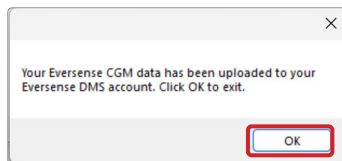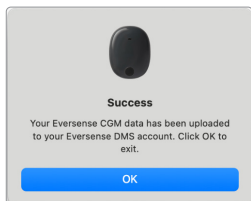

(מחשב)

(Mac)

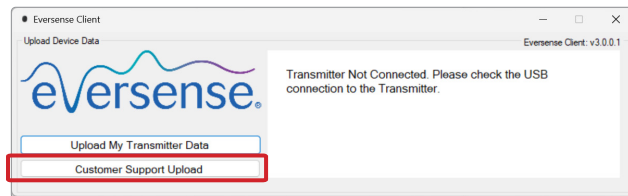


**הערה:** בעת יצירת קשר עם מחלקת שירות הלקוחות לתמיכה טכנית, אתה עלול להתבקש להעלות את יומן הניתוחים. הדבר ישמש על מנת לשלוח קובץ יומן ניתוחים מן המשדר החכם שלך אל מחלקת שירות הלקוחות. פונקציה זו תהיה בשימוש לאיתור וטיפול מתקדם בבעיות בעזרת הסיוע של מחלקת שירות הלקוחות.

# Data Share (שיתוף נתונים)

אתה יכול לחבר את חשבון Eversense DMS שלך אל חשבון Eversense DMS Pro השייך למרפאה שלך. דבר זה יאפשר למרפאה לצפות בנתוני הסוכר והדוחות שלך.

תהיה זקוק למספר ה-DMS Pro Clinic של המרפאה שלך. צור קשר עם המרפאה שלך אם אין לך אותו.

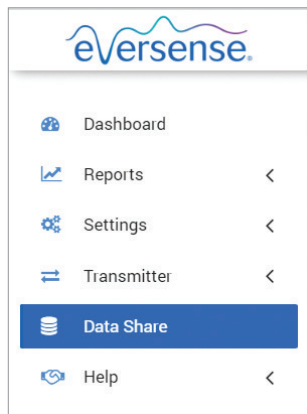

## שיתוף נתונים עם המרפאה שלך

על מנת לחבר את חשבון Eversense DMS שלך אל חשבון Eversense DMS Pro השייך למרפאה שלך:

1. מתפריט הניווט, בחר **Data Share (שיתוף נתונים)**.

2. בתיבה ליד **"Clinic #"** (מספר מרפאה) הקלד את מספר ה-Eversense DMS Pro של המרפאה שלך, ובחר את המרפאה מן הרשימה הנשלפת. לחץ על **"Select"** (בחר).

The image shows a screenshot of the 'Share my data to clinic' form. The form has a title bar and a main content area. In the main content area, there is a 'Clinic #' field with the value '7536'. To the right of the field is a 'Select' button, which is highlighted with a red box. To the right of the 'Select' button is a 'Provider' dropdown menu with the text 'Select a provider'. To the right of the dropdown menu is a 'Share My Data' link with a left-pointing arrow. Below the form is a table with the following columns: '7536 - Mellon Endocrine', 'PROVIDER LAST NAME', 'PROVIDER FIRST NAME', 'STATUS', and 'DATA SHARING'. A red arrow points from the 'Select' button to the 'Share My Data' link.

3. בחר את הספק שלך מרשימת הספקים הנשלפת.

4. לחץ על קישור "Share My Data" (שתף את הנתונים שלי). המרפאה והספק שלך יוצגו כעת ברשימת שיתוף הנתונים שלך.

מצב המרפאה יוצג בתור **Pending** (ממתין). לאחר שהמרפאה מקבלת את ההזמנה שלך, המצב ישתנה אל **Accepted** (התקבל).

Share my data to clinic

Clinic #  [Select](#) Provider  [Select a provider](#) [Share My Data](#)

CLINIC NAME	PROVIDER LAST NAME	PROVIDER FIRST NAME	STATUS	DATA SHARING
Clinic two	clinictwo	dmsproie	Pending	<a href="#">Cancel</a>

Clinic #  [Select](#) Provider  [Select a provider](#) [Share My Data](#)

CLINIC NAME	PROVIDER LAST NAME	PROVIDER FIRST NAME	STATUS	DATA SHARING
Mellon Endocrine	Mellon	Natalie	Accepted	<a href="#">Stop</a>

## קבלת הזמנה לשיתוף נתונים מהמרפאה שלך

אם ספק שירותי הבריאות שלך מזמין אותך לשתף את הנתונים שלך באמצעות חשבון ה-Eversense DMS Pro שלו:

- מחשבון Eversense DMS שלך: בחר **Data Share (שיתוף נתונים)** בתפריט הניווט השמאלי, חפש את שם המרפאה וקבל או דחה את ההזמנה.

## הסרה של המרפאה שלך

- מחשבון DMS שלך: בחר **Data Share (שיתוף נתונים)** בתפריט הניווט השמאלי, ובחר **“Stop” (עצור)** או **“Cancel” (בטל)** ליד שם המרפאה.

# Help (עזרה)

## About (אודות)

עמוד זה מציג את הגרסאות העדכניות ביותר של ה-Eversense DMS ושל אפליקציית הלקוח של Eversense.

### צרו אתנו קשר

פרטי קשר לתמיכה בלקוחות.

Contact Us
For Customer Support, please contact your local distributor. To see a list of Eversense distributors, please visit <a href="https://global.eversensediabates.com/distributors">https://global.eversensediabates.com/distributors</a>

חשוב: לשאלות אודות מערכת ה-Eversense CGM, צור קשר עם המפיץ המקומי שלך.

חשוב: נטרול של חשבון ה-Eversense DMS ינטרל את החשבון שלך בכל מוצרי Eversense.

### Deactivate Account

#### Deactivate My Account

\* Mandatory field

Please submit the form below to deactivate your account.

Reason *	Please select a valid reason	▼
Password *	Password	👁
Secret Question	What is the name of your first pet?	
Answer *	Answer	

Cancel
Submit

## שחרר הערות

מספק מבט כללי על העדכונים האחרונים בתכנת Eversense DMS.

**הערה:** כאשר ישנו עדכון זמין עבור תכנת Eversense DMS, יוצג כיתוב לרוחב החלק העליון של האתר. לחץ על הכיתוב על מנת לראות את רשימת העדכונים.

# Eversense NOW .22

## ניטור מרחוק באמצעות מערכת Eversense CGM ואפליקציית Eversense NOW

אפליקציית Eversense כוללת מאפיין אופציונלי של ניטור מרחוק. מאפיין זה מאפשר צפייה בנתוני Eversense CGM בתצוגה משנית דרך האפליקציה Eversense NOW למכשירים ניידים.

### השימוש המיועד

האפליקציה Eversense NOW מיועדת לשימוש כתצוגה משנית לצפייה בנתוני הסוכר ובהתרעות ממשתמשי Eversense CGM.

### התוויות נגד

פעל בהתאם להנחיות המרפאה או כל מוסד אחר לשימוש במכשיר הנייד בנוכחות מכשירי MRI, סריקות CT וציוד אחר לביצוע הליכים.

### סיכונים

עלולים להיות זמנים בהם לא ניתן יהיה לשלוח נתוני סוכר אל אפליקציית Eversense NOW. אם אתה לא מקבל נתוני סוכר ממשתמש ה-Eversense CGM, איך יכול לעזור להם במקרים של רמות סוכר גבוהות או נמוכות. מאפיין הניטור מרחוק מספק תצוגה משנית של נתונים. זו איננה מערכת לניטור מרחוק בזמן אמת.

ייתכן שלא תמיד יהיה חיבור לתמיכה בהעברת נתונים כגון אינטרנט/wifi או 3G/4G/LTE למשתמשי Eversense CGM. אי אפשר לצפות בנתוני הסוכר שלך או של משתמש Eversense CGM ללא חיבור לאינטרנט. כל בעיה עם המכשירים הניידים, האינטרנט האלחוטי, חיבורי הנתונים, מערכת ניהול הנתונים של Eversense (DMS), אם המשדר החכם של משתמש ה-CGM נמצא מחוץ לטווח המכשיר הנייד שלו, או טעינה של המכשיר החכם, יכולים לגרום לאיחור בהעברת הנתונים או לא להציג את הנתונים בכלל. משתמש Eversense אינו יכול להסתמך על הניטור שלך של נתוני הסוכר שלו כדי לסייע לו במקרה של אירוע סוכר גבוה או נמוך. מידע בטיחותי נוסף זמין בכתובת <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

## הטבות

מערכת Eversense CGM שנמצאת בשימוש עם אפליקציית ה-Eversense NOW לניטור מרחוק יכולה לספק למשתמשי ה-CGM ביטחון נוסף, כאשר הם מודעים לעובדה שאחרים יכולים גם לראות את נתוני ה-CGM שלהם.

### אזהרות:

- אין להשתמש במידע על הסוכר המוצג באפליקציית Eversense NOW על מנת לבצע החלטות טיפול. נתוני אפליקציית Eversense NOW מהווים תצוגה משנית של נתוני Eversense CGM ואין להשתמש בהם במקום התצוגה הראשונית של Eversense CGM. משתמשי Eversense CGM צריכים להשתמש תמיד בערכי הסוכר בדם מהמד שלהם כדי לקבל החלטות בנוגע לטיפול. שימוש בערך סוכר של החיישן לקבלת החלטה לגבי טיפול עלול לגרום לרמת סוכר בדם גבוהה או נמוכה בדם.
- משתמשי Eversense CGM אינם צריכים להסתמך על כך שהגורמים המנטרים מרחוק את קריאות הסוכר ידווחו להם על אירועי סוכר גבוה או נמוך.

## אמצעי זהירות:

- האפליקציה למכשיר נייד Eversense NOW איננה מחליפה את משטר הניטור אשר ניתן ישירות על ידי הצוות הרפואי שלך.
- אם תכונת הסנכרון האוטומטי לא מופעלת אצל משתמש Eversense CGM (תכונה שמאפשרת לשלוח נתונים באופן אוטומטי לאפליקציית Eversense NOW), ייתכן שלא תראה מגמות ואירועים של סוכר גבוה או נמוך.
- אם לך ולמשתמשי Eversense CGM אין חיבור לאינטרנט, או שהמכשיר הנייד של משתמש CGM נכבה עקב סוללה חלשה או ריקה, נתוני Eversense CGM שלו לא יוצגו באפליקציית Eversense NOW.
- אם תכבה את הצלילים במכשיר הנייד, לא תקבל התרעות קוליות אודות נתוני CGM שלגביהם מופעל ניטור מרחוק באפליקציית Eversense NOW.
- אם משתמש CGM מגדיר את מצבו כ-'לא מקוון', לא תקבל את נתוני ה-CGM שלו באפליקציית Eversense NOW.
- אפליקציית Eversense NOW איננה מתקשרת באופן ישיר עם חיישן Eversense ו/או עם המשדר החכם Eversense.
- אפליקציית Eversense NOW לא יכולה לשנות את ההגדרות של אפליקציית Eversense CGM שלך.
- אם לא תאפשר קבלת הודעות מאפליקציית Eversense NOW, לא תקבל התרעות הקשורות לסוכר ממשתמשי Eversense CGM.
- אם המכשיר הנייד שלך נמצא במצב 'נא לא להפריע', אתה לא תוכל לשמוע הודעות המגיעות מאפליקציית Eversense NOW.

# שימוש באפליקציית Eversense NOW

חלק זה ינחה אותך כיצד להשתמש באפליקציית Eversense NOW לניטור מרחוק של הסוכר של משתמשי מערכת Eversense CGM.

תודה לך שהורדת את אפליקציית Eversense NOW. Eversense NOW מאפשרת לך לנטר מרחוק את נתוני הסוכר המגיעים ממשתמשי מערכת Eversense CGM.

**זהירות: אפליקציית הניטור מרחוק Eversense NOW אינה מחליפה את התצוגה הראשית באפליקציית המערכת Eversense CGM או את משטר הניטור שנקבע על-ידי צוות רפואי.**

## דרישות המערכת

- אפליקציית Eversense NOW הורדה למכשיר הנייד שלך מ-Apple® App Store.
  - מכשיר אנדרואיד תואם או Apple® iPhone® או iPod® או iPad®.
  - עבור רשימת מכשירים מתאימים, אנא בקר באתר [global.eversenseddiabetes.com/compatibility](http://global.eversenseddiabetes.com/compatibility).
- הערה:** נדרש חיבור אלחוטי אל האינטרנט על מנת להוריד את האפליקציה ועל מנת לקבל ערכי סוכר מרוחקים לתצוגה על גבי אפליקציית ה-Eversense NOW שלך. אם משתמש Eversense CGM כיבה את הסנכרון האוטומטי, לא יישלחו נתוני סוכר אל אפליקציית Eversense NOW.

## הסכם רישיון עבור משתמש קצה ומדיניות פרטיות

השימוש באפליקציית Eversense NOW כפוף לתנאים ולהתניות של הסכם הרישיון למשתמש קצה העדכני ביותר של אפליקציית Eversense NOW ולמדיניות הפרטיות של אפליקציית Eversense NOW. מסמכים אלה מתעדכנים מעת לעת, ומתפרסמים באתר [global.eversenseddiabetes.com](http://global.eversenseddiabetes.com).

## מכשירים פרוצים

אין להשתמש באפליקציות של Eversense במכשירי iPhone, iPad או iPod פרוצים. מכשירים פרוצים לא מספקים רמה קבילה של אבטחה ודיוק עבור המשתמש, ואינם מאושרים לשימוש על-ידי Senseonics.

## עזרה ותמיכה


אם אינך מבין משהו במדריך זה למשתמש, צור קשר עם המפיץ המקומי או בקר באתר [global.eversenseddiabetes.com](http://global.eversenseddiabetes.com) על מנת לראות מיהו המפיץ המקומי באזורך.

# הצטרפות ל-Eversense Circle

*Eversense Circle* היא קבוצה של אנשים שיכולים לנטר מרחוק את נתוני הסוכר וההתרעות הקשורות לסוכר של משתמש *Eversense CGM*. כדי להצטרף ל-*Circle*, תצטרך לאשר את ההזמנה בדוא"ל שתקבל ממשתמש *Eversense CGM*, ליצור חשבון באתר האינטרנט של *Eversense DMS* ולהוריד את אפליקציית *Eversense NOW* למכשירים ניידים.

## הורדת אפליקציית Eversense NOW

1. עבור אל Apple App Store או Google Play Store וחפש "**Eversense NOW**".
2. הקש על סמל **Eversense NOW**, הורד את האפליקציה והתקן אותה במכשיר החכם שלך.
3. כאשר תוצג לך הנחיה, הקש על "**Allow**" (**אפשר**) כדי לקבל התרעות הקשורות לסוכר ממשתמשי *Eversense CGM* ברשימה שלך.

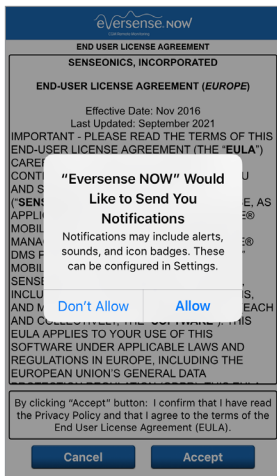

**זהירות: אם לא תאפשר קבלת הודעות מאפליקציית Eversense NOW, לא תקבל התרעות הקשורות לסוכר ממשתמשי Eversense CGM.**



**חשוב: אל תוסיף את האפליקציה ל-Private Space או תכונות דומות של מכשירים ניידים שימנעו ממנה לספק הודעות או לתקשר עם שאר המערכת.**

#### 4. צור חשבון Eversense כדי להיכנס לאפליקציה.

**הערה:** אם כבר יש לך חשבון Eversense, אינך צריך ליצור חשבון חדש כדי להשתמש ב-Eversense NOW.  
**הערה:** למטרות בטיחות, אם אתה מזין סיסמה שגויה שלוש פעמים עוקבות באפליקציה הניידת, החשבון שלך יינעל למשך 30 דקות. במהלך זמן זה, לא תהיה לך גישה אל נתוני המשתמשים Eversense CGM המנוטרים מרחוק.

#### 5. קבל את הסכם הרישיון למשתמש הקצה.

6. בחר את יחידת המידה. יחידת המידה שתבחר תחול על כל משתמשי Eversense CGM שאת נתוניהם תוכל לראות. לא ניתן לשנות את יחידת המידה לאחר שהאפליקציה מותקנת.

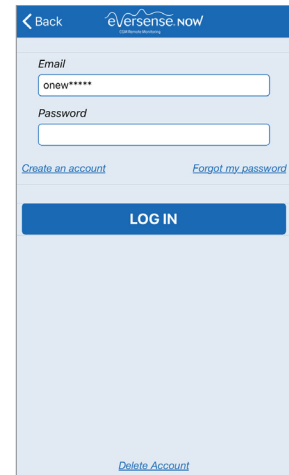
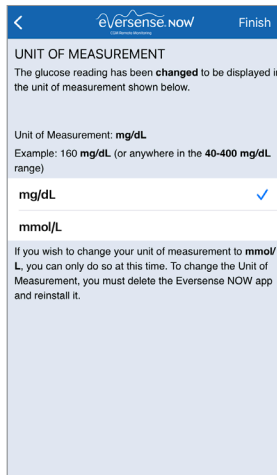


# הזמנות למעגלים

*Eversense Circle* היא קבוצה של אנשים שיכולים מאושרים לנטר מרחוק את נתוני הסוכר וההתרעות הקשורות לסוכר של משתמש *Eversense CGM*. כדי להצטרף ל-*Circle*, תצטרך ליצור חשבון ולהוריד את אפליקציית *Eversense NOW* למכשירים ניידים.

## אישור או דחיית הזמנה להצטרף ל-*Eversense Circle*





*Eversense Circle* היא קבוצת אנשים שהזמנו על-ידי משתמש *Eversense CGM* לצפות בנתוני הסוכר וההתרעות שלו מרחוק. כחבר מוזמן ב-*Circle*, תקבל דוא"ל הזמנה להצטרף ל-*Circle*. על מנת לקבל את ההזמנה, תהיה זקוק לאפליקציית *Eversense NOW*.

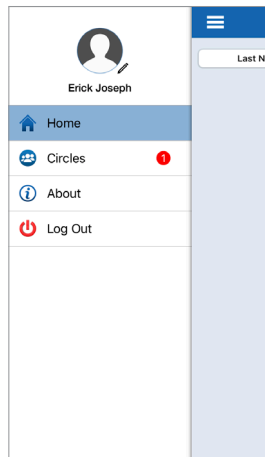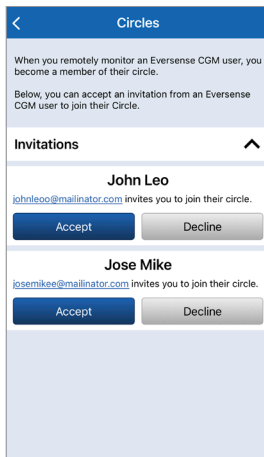

אתה יכול לנהל את כל ההזמנות הממתינות שקיבלת בתוך תפריט Circles. יש לך את האופציה **Accept** (לקבל) או **Decline** (לדחות) כל הזמנה ממתינה.

על מנת לקבל הזמנה:

1. בתוך התפריט הראשי, הקש על **“Circles”** (מעגלים).
2. הקש על **“Accept”** (קבל).
3. הקש על **“OK”** כדי לאשר.
4. השם/תמונה של משתמש ה-Eversense CGM יוצגו בעמוד הבית.

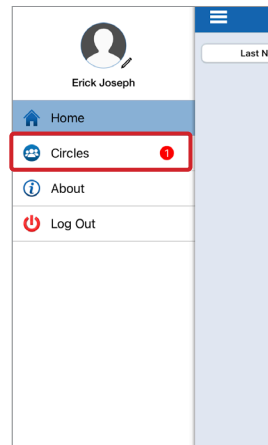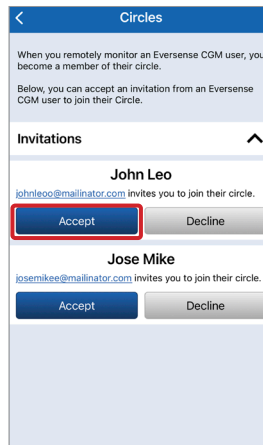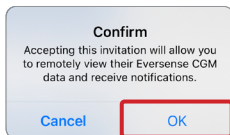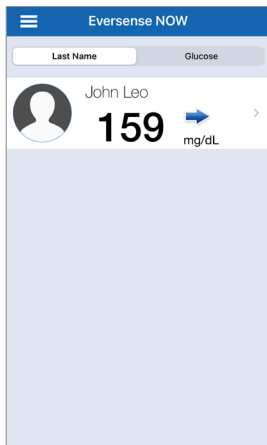


## על מנת לדחות הזמנה:




1. הקש על "Decline" (דחה).

2. הקש על "OK" כדי לאשר.

3. ההזמנה תוסר מרשימת ההזמנות שלך.


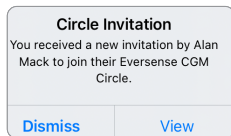


אם אפליקציית Eversense  
NOW פתוחה ותקבל הזמנה  
חדשה, תופיע הודעת קופצת.

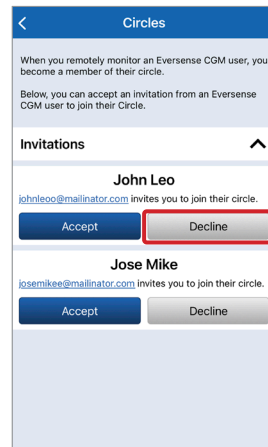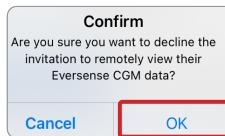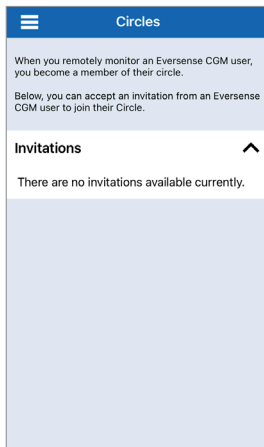

## הסרת משתמש Eversense CGM מן הרשימה שלך



אם תסיר משתמש Eversense CGM מהרשימה, לא תוכל עוד לנטר מרחוק את נתוני הסוכר שלו. בכדי להוסיף משתמש בחזרה לרשימה, צור קשר עם משתמש Eversense CGM כדי לבקש ממנו שישלח הזמנה חדשה.

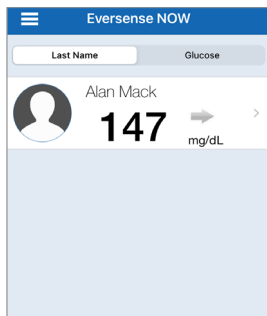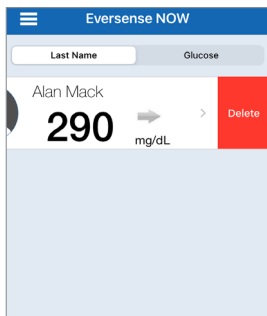

**1. החלק על השם של משתמש Eversense CGM בצד שמאל של דף הבית.**

**2. לחץ על "Delete" (מחק).**


תוצג אזהרה שבה תתבקש לאשר שברצונך להסיר את משתמש Eversense CGM.

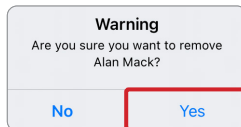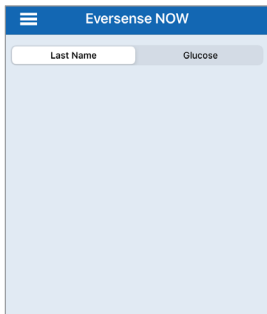

**3. לחץ על "Yes" (כן) כדי להסיר לצמיתות אדם זה מן הרשימה שלך.**

דף הבית לא יציג עוד את המשתמש ברשימה שלך.

**הערה:** ייתכן שיחלפו שעתים עד שמשתמש Eversense CGM יראה שאינך חבר עוד במעגל שלו באפליקציית Eversense CGM שלו.

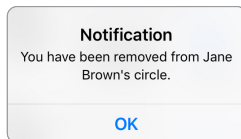

**הערה:** גם משתמש Eversense CGM יכול להסיר אותך מהמעגל שלו. במקרה זה, הודעה זו תופיע.


# תפריט ראשי

התפריט הראשי מציג את הגישה לעמוד הבית של Eversense NOW, עמוד Circles (מעגלים), עמוד About (אודות) ועמוד Log Out (יציאה).


העמוד אודות מקשר אותך לאתר Eversense CGM, ומספק את גרסת האפליקציה ותאריך השחרור של האפליקציה.

כדי לגשת לתפריט הראשי, לחץ על סמל 3 הפסים בפינה השמאלית העליונה של המסך.


מהתפריט הראשי תוכל לגשת לדף הבית כדי לראות את משתמשי Eversense CGM ברשימה שלך, לסקור את המידע אודות אפליקציית Eversense NOW בדף About (אודות), לצאת מהאפליקציה או להוסיף תמונת פרופיל.

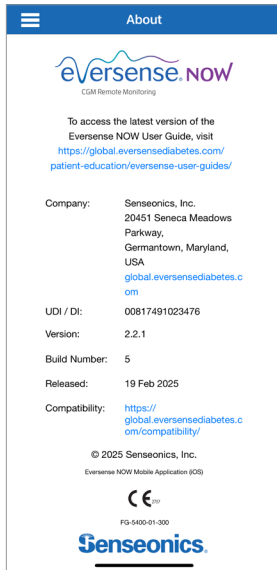

About (אודות)

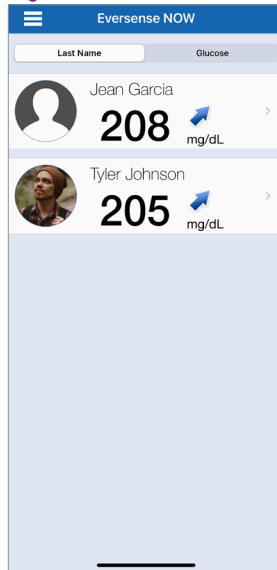


דף הבית

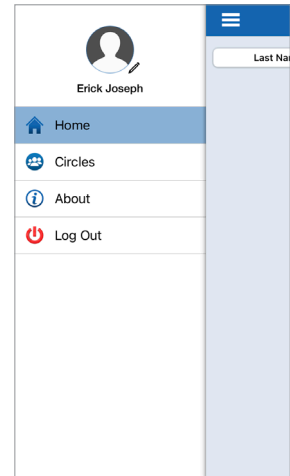


אתה יכול להוסיף את תמונת הפרופיל שלך על ידי לחיצה על תמונת הפרופיל בתפריט הראשי של Eversense NOW. עקוב אחר ההנחיות על מנת לצלם או להוסיף תמונה השמורה בתוך המכשיר הנייד שלך. תמונת הפרופיל שתוסיף תוצג גם באפליקציה של משתמש CGM לצד שמך.

אפליקציית Eversense NOW תבקש ממך אישור לפני היציאה. אם תצא מהאפליקציה, תצטרך להזין את שם המשתמש והסיסמה כדי לפתוח מחדש את האפליקציה.

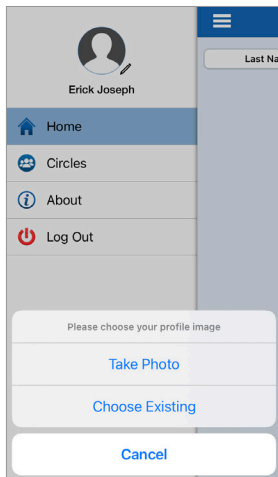

תמונת פרופיל

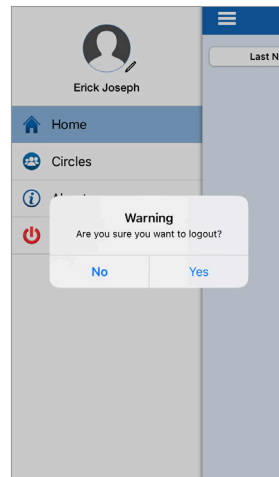

Log Out (יציאה)

# צפייה בנתוני CGM

דף הבית מציג את רשימת האנשים שבנתוני CGM שלהם תוכל לצפות מרחוק, יחד עם ערך CGM האחרון שלהם וחץ מגמה שמציין את כיוון השינוי וקצב השינוי.

ברירת מחדל למיין רשימה זו היא שם המשפחה. ניתן למיין את הרשימה לפי שם משפחה או ערך סוכר, על ידי לחיצה על הלשונית הרצויה בחלק העליון של הדף.

## דף הבית של Eversense NOW


כדי לרענן את דף הבית:

1. פתח את Home Page (דף הבית).


2. החלק מטה מתוך דף הבית.

נתוני הסוכר של משתמש CGM מטרעננים באופן אוטומטי באפליקציית Eversense NOW מדי 5 דקות כאשר אתה ומשתמש CGM מחוברים לאינטרנט ויהיה ניתן לשתף נתונים.

**הירות: אם משתמש Eversense CGM כיבה את הסנכרון האוטומטי, לא יישלחו נתוני סוכר באופן אוטומטי אל אפליקציית Eversense NOW.**

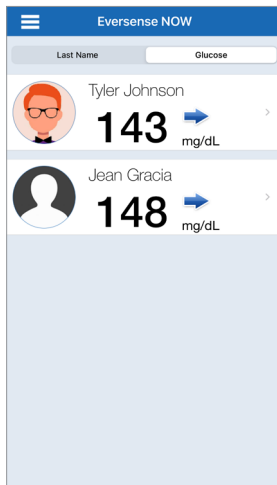

דף הבית ממויין לפי ערך סוכר, מהנמוך אל הגבוה

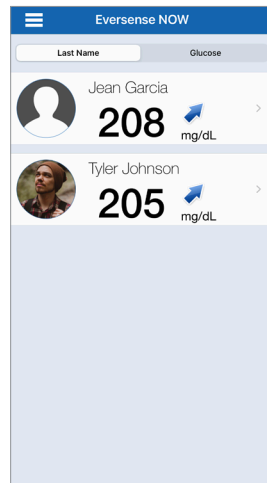






דף הבית ממויין לפי שם משפחה

## חצי מגמה

לצד השם של משתמש Eversense CGM תראה חץ מגמה. חץ המגמה מציג את הכיוון הנוכחי של הסוכר ובאיזו מהירות המגמה משתנה.

האפליקציה עושה שימוש ב-20 הדקות האחרונות של ניטור רמות סוכר רציף על מנת לחשב את מגמות רמות הסוכר. כאשר אין מספיק ערכי חיישן זמינים לחישוב, החץ לא יוצג.


עלייה או ירידה הדרגתית של רמות סוכר, הנופלות או עולות בשיעור בין 0.0 מ"ג/ד"ל ל-1.0 מ"ג/ד"ל דקה.	
עלייה מתונה של רמות הסוכר, העולות בשיעור בין 1.0 מ"ג/ד"ל ל-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.	
ירידה מתונה של רמות הסוכר, הנופלות בשיעור בין 1.0 מ"ג/ד"ל ל-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.	
עלייה מאוד מהירה של רמות הסוכר, העולות בשיעור של יותר מ-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.	
ירידה מאוד מהירה של רמות הסוכר, היורדות בשיעור של יותר מ-2.0 מ"ג/ד"ל לדקה.	

ישנם חמישה מצבים שונים שעשויים להיראות לצד שם של משתמש מערכת Eversense CGM.

“ --- ”

המסדר החכם של המשתמש מחובר אך אינו מקבל כעת נתוני סוכר או שאין מספיק נתוני סוכר להצגת ערך. סיבות אפשריות:

- מערכת CGM נמצאת במצב חימום.
- משתמש CGM נמצא בשלב האתחול ועדיין לא קיבל את קריאת הסוכר הראשונה שלו.
- המשתמש קיבל התרעה שמונעת את הצגת נתוני הסוכר.

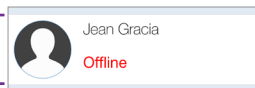

**קריאת הסוכר האחרונה**  
המשתמש מקבל נתוני סוכר באופן פעיל.

**“Offline” (לא מקוון)**  
המשתמש כיבה באופן זמני את שיתוף הנתונים עמך. (ייתכן שתחלופנה עד 10 דקות עד שעדכון מצב זה יוצג באפליקציית Eversense NOW).

**“No Internet” (ללא אינטרנט)**

- כאשר משתמש Eversense CGM אינו מחובר אל האינטרנט.
- משתמש CGM כיבה את הסנכרון האוטומטי.

**“Transmitter Disconnected” (המסדר מנותק)**

אין חיבור בין המסדר החכם לאפליקציית Eversense CGM. סיבות אפשריות:

- יש להטעין את סוללת המסדר החכם או שהיא נטענת כעת.
- ייתכן שחיבור ה-Bluetooth, או המכשיר הנייד כבויים.
- המסדר החכם נמצא מחוץ לטווח או שהוא כבוי.


## חיבור אינטרנט

נדרש חיבור לאינטרנט כדי שאפליקציית Eversense NOW תציג את נתוני Eversense CGM.

אם הטלפון מנותק מהאינטרנט, החלון הקופץ הבא יוצג:

עד שחיבור האינטרנט ישוחזר, רשימת משתמשי ה-CGM שלך ב-Eversense NOW ונתוני הסוכר שלהם לא יוצגו.


לאחר שחיבור האינטרנט ישוחזר, רשימת משתמשי ה-CGM שלך ב-Eversense NOW ונתוני הסוכר שלהם לא יוצגו.

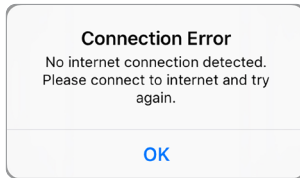

## גרף מגמה

כדי לראות נתוני סוכר מפורטים יותר אודות משתמש CGM, הקש על שם של משתמש מערכת Eversense CGM כלשהו בדף הבית. במסך הראשון מופיע גרף מגמה של ערכי הסוכר בחיישן של המשתמש בשלוש השעות האחרונות. חץ מגמה מציין את הכיוון הנוכחי של הסוכר ובאיזו מהירות מגמת הסוכר משתנה.

כדי לרענן את המסך, הקש על סמל רענן.

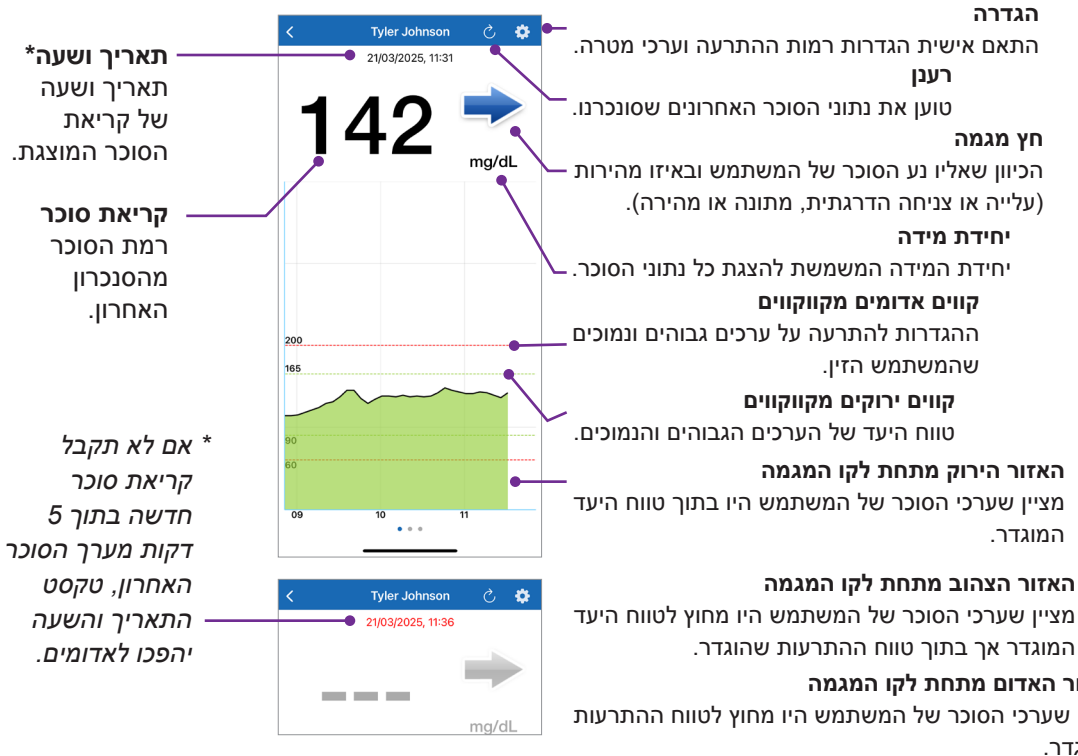


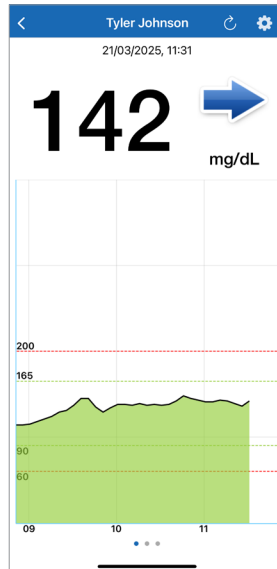
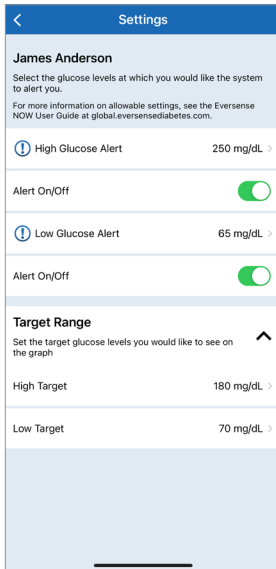
## הגדרות מותאמות אישית

אפליקציית Eversense NOW תשלח לך התרעה כאשר רמות הסוכר נמצאות מחוץ להגדרות ההתרעה אותן קבעת עבור משתמש CGM זה. ההגדרות המוצגות (ברירת מחדל) משקפות את הגדרות משתמש ה-CGM.

אתה יכול להתאים אישית את רמות ההתרעה שבהן תרצה לקבל התרעה על ידי אפליקציית Eversense NOW. לאחר ההתאמה, האפליקציה תיתן התרעה קולית (בהתאם להגדרות הטלפון שלך) וכן תציג הודעה על המסך.

**הערה:** שינוי הגדרות ההתרעה או היעד אינו משנה את הגדרות ההתרעה או היעד שמשתמש CGM הגדיר במערכת שלו.

כאשר אתה צופה בגרף המגמה של משתמש CGM, אתה יכול להתאים אישית את הגדרות ההתרעה על ידי  הקשה על



כדי להתאים אישית הגדרות רמות ההתרעה וערכי מטרה:

## 1. הקש על .

## 2. בחר את רמות ההתראה לגבי סוכר גבוה ונמוך שבהן תרצה שהמערכת תתריע.

- א. לחץ על "High Glucose Alert" (התרעה על סוכר גבוה) ובחר את רמת ההתרעות המתאימה עבור רמת הסוכר הגבוהה.
- ב. לחץ על "Done" (סיום) לאחר ההשלמה.
- ג. חזור על התהליך על מנת לבצע את הבחירה עבור "Low Glucose Alert" (התרעה על סוכר נמוך).

הגדרות מוצגות (ברירת מחדל)	הגדרות משתמש CGM
ההגדרה המותרת	נמוכה: 60 - 115 מ"ג/ד"ל גבוהה: 125 - 350 מ"ג/ד"ל
הגדרת הפעלה/כיבוי	את הגדרת התרעת הסוכר הגבוה והסוכר הנמוך ניתן להפעיל או לכבות.

3. בחר את רמות יעד עבור רמות סוכר. אלו הן הרמות הנמוכות והגבוהות המשמשות לציון כאשר ערכי הסוכר של משתמש ה-CGM נמצאים בטווח היעד. יש להגדיר את טווח היעד הגבוה והנמוך בתוך רמות ההתרעה הגבוהות והנמוכות של הסוכר המותאמות אישית שבחרת.
- א. תחת Glucose Target Levels (רמות היעד של הסוכר), לחץ על "High Target" (יעד גבוה) ובחר את רמת יעד הסוכר הגבוה המתאימה.
- ב. לחץ על "Done" (סיום) לאחר ההשלמה.
- ג. חזור על השלב לבחירת "Low Target" (יעד נמוך).

הגדרות מוצגות (ברירת מחדל)	הגדרות משתמש CGM
ההגדרה המותרת	נמוכה: 65 - 120 מ"ג/ד"ל גבוהה: 120 - 345 מ"ג/ד"ל
הגדרת הפעלה/כיבוי	תמיד פועל
הערות	בשימוש בגרפים ותרשימים באפליקציה על מנת להראות את הזמן בו היית בטווח היעד.

**אזהרות:** אין להשתמש במידע על הסוכר המוצג באפליקציית Eversense NOW על מנת לבצע החלטות טיפול. נתוני אפליקציית Eversense NOW מהווים תצוגה משנית של נתוני Eversense CGM ואין להשתמש בהם במקום התצוגה הראשונית של Eversense CGM.

## התרעות של Eversense NOW

כאשר ערך הסוכר של משתמש Eversense CGM נמצא מחוץ לטווח ההתרעה שנקבע, אפליקציית Eversense NOW תתריע.


התרעות אלה יופיעו באחת מארבע דרכים: במסך הנעילה, כהודעה בחלק העליון של המסך, כחלון מוקפץ בתוך האפליקציה או ב-Apple Watch.

**אזהרה:** אין להשתמש במידע על הסוכר המוצג באפליקציית Eversense NOW על מנת לבצע החלטות טיפול. נתוני אפליקציית Eversense NOW מהווים תצוגה משנית של נתוני Eversense CGM ואין להשתמש בהם במקום התצוגה הראשונית של Eversense CGM.


**הערה:** יש להפעיל שיקוף הודעות בהגדרות של הודעות Apple Watch עבור Eversense NOW כדי לקבל התרעות על סוכר ב-Apple Watch.



התרעה: ב-Apple Watch

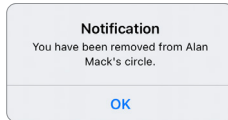

התרעה: חלון מוקפץ בתוך האפליקציה

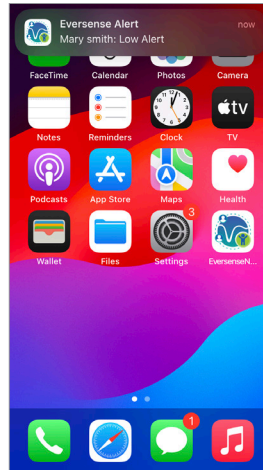

התרעה: הודעה



התרעה: מסך נעילה

Glucose Alerts		
Thursday, 16 May 2024		
🚨	Out of Range High Glucose	12:54
🚨	Out of Range Low Glucose	12:53
Wednesday, 15 May 2024		
🚨	High Glucose	19:04
🚨	Low Glucose	18:34
🚨	High Glucose	17:50
🚨	High Glucose	17:42
🚨	High Glucose	17:34
🚨	Low Glucose	16:45
Tuesday, 14 May 2024		
🚨	High Glucose	17:08
🚨	Low Glucose	17:07

## Alert History (היסטוריית התרעות)

בכדי להציג את היסטוריית התרעות הסוכר של משתמש מערכת Eversense CGM, החלק על המסך שמאלה מגרף המגמה.

מסך **Alert History (היסטוריית התרעות)** יציג את 20 ההתרעות הקשורות לסוכר שהמשתמש קיבל באפליקציית Eversense NOW.

התרעות אלו עוקבות אחר אירועים כגון ההתרעות על רמת הסוכר הגבוהה והנמוכה.

## Event Log (יומן אירועים)

כדי להציג את מסך Event Log (יומן אירועים) של משתמש מערכת Eversense CGM, החלק על המסך שמאלה מ-Alert History (היסטוריית התרעות).

מסך **Event Log (יומן אירועים)** מציג את 20 האירועים האחרונים שנרשמו על-ידי משתמש CGM. יומן האירועים מציג מידע שהוזן על-ידי משתמש Eversense CGM, כגון כילויים, ארוחות, פעילות גופנית, ערכי סוכר בדם, רמות אינסולין ומצב בריאות ופעילות גופנית. אם המשתמש לא הזין אירועים כלשהם, יומן זה יהיה ריק.

Event Log	
Friday, 21 March 2025	
Calibration, 148 mg/dL	12:06
Exercise	08:20
Thursday, 20 March 2025	
Insulin	20:04
Meal	13:05
Wednesday, 19 March 2025	
Calibration, 48 mg/dL	16:42
Tuesday, 18 March 2025	
Calibration, 100 mg/dL	16:44
Glucose, 100 mg/dL	16:37
Calibration, 100 mg/dL	16:34
Calibration, 47 mg/dL	14:40
Monday, 17 March 2025	
Calibration, 63 mg/dL	21:15
Calibration, 61 mg/dL	21:04
Calibration, 99 mg/dL	15:36

# הודעות משפטיות

## הודעה משפטית מטעם Apple

"מיוצר עבור iPod touch", "מיוצר עבור אייפון" ו-"מיוצר עבור אייפד" פירושם שאביזר חשמלי עוצב על מנת להתחבר באופן ספציפי אל iPod touch, אייפון או אייפד, בהתאמה, והוא אושר על ידי המפתח על מנת להתאים לתקני הביצועים של Apple. Apple לא תהיה אחראית לפעולה של המכשיר או לציות המכשיר לתקני הבטיחות והתקנים הממוסטים הרלוונטיים. אנא שים לב שהשימוש באביזר זה ביחד עם iPod touch, אייפון או אייפד יכול להשפיע על הביצוע האלחוטי.

Apple, אייפון, אייפד, אייפוד ו-iPod touch הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

## הודעה משפטית מטעם Google

השם "אנדרואיד" הלוגו אנדרואיד ו-Google Play הם סימנים מסחריים של Google Inc.

## אודות Bluetooth®

Bluetooth® הוא סוג של תקשורת אלחוטית (RF). מכשירים ניידים כגון טלפונים חכמים עושים שימוש בטכנולוגיית Bluetooth® כמו גם מכשירים רבים נוספים. המשדר החכם שלך עושה שימוש ב-Bluetooth® Smart על מנת להתחבר אל המכשיר הנייד ולשלוח את התוצאות אל האפליקציה.

## סימן מסחרי Bluetooth®

סימן המילה Bluetooth® והלוגו הם בבעלותה של Bluetooth® SIG, Inc. וכל שימוש של סימנים אלו על ידי Senseonics, Inc. נמצא תחת רישיון.

המשדר החכם שלך מציית לחלק 15 של חוקי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:  
(1) למכשיר אסור לגרום להפרעות מזיקות.

(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

שינויים או התאמות אשר לא אושרו באופן מפורש על ידי Senseonics, Inc., יכולים לפגום בסמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

קווים מנחים אלו עוזרים להבטיח שהמשדר החכם שלך לא יפריע לפעולתם של התקנים חשמליים אחרים הנמצאים סמוך אליו. בנוסף, התקנים חשמליים אחרים לא צריכים להפריע לפעולתו של המשדר החכם.

למעט המכשיר הנייד שלך, התקנים חשמליים אלחוטיים אחרים הפועלים בסמוך למשדר החכם, כגון טלפונים ניידים, תנורי מיקרוגל או רשת אלחוטית, עלולים למנוע או לדחות את העברת הנתונים מן המשדר החכם שלך אל האפליקציה. כדי לחדש את התקשורת, התרחק ממכשירים אלקטרוניים אלה או כבה אותם.

המשדר החכם נבחן ונמצא מתאים לשימוש ביתי. ברוב המקרים, הוא איננו אמור להפריע לפעולת מכשירי חשמל אחרים הנמצאים בבית אם השימוש בו נעשה בהתאם להוראות. עם זאת, משדר חכם זה מייצר אנרגיית תדר רדיו. אם נעשה בו שימוש לא מתאים, המשדר החכם שלך עלול להפריע לפעולת הטלוויזיה, הרדיו או פעולת התקנים חשמליים אחרים בביתך אשר מקבלים או משדרים אותות RF.

אם תיתקל בבעיות הקשורות להפרעות למשדר החכם, נסה להתרחק ממקורות ההפרעה. תוכל גם להעביר את המכשיר האלקטרוני או האנטנה שלו למיקום אחר כדי לפתור את הבעיה.

אם תמשיך להיתקל בהפרעות, פנה לשירות לקוחות של יצרן המכשיר האלקטרוני שגורם להפרעה.

### הנחיית ציוד רדיו

Senseonics, Inc. מצהירה שציוד הרדיו מסוג משדר חכם Eversense E3 הוא בהתאם להנחיה EU/2014/53. הטקסט המלא של הצהרת התאימות האירופית זמין בכתובת האינטרנט הבאה:

<https://global.eversensedidiabetes.com/declarationofconformity>

מסדר חכם, שימוש..... 43, 42	חיישן, החדרה	אירועים..... 137, 79
מסדר חכם, תחזוקה..... 48	הסרה..... 186, 185	איתור וטיפול בבעיות,
נורית חיווי..... 49, 47, 42, 26	חצי מגמה..... 65	שאלות נפוצות..... 188
נסיעות..... 187	יחידת מידה..... 32	אלחוטי..... 307, 59, 24, 13
סוללה, טעינה..... 25	כיול, הליך..... 79, 55, 50	אפליקציה, אודות..... 79, 11
סמלים, אריזה	כיול, שלב אתחול..... 52, 50	אפליקציה, הורדה..... 27
ומכשיר..... 231, 230, 229	כיול, שלב יומי..... 53, 50	אפליקציה, הפעל..... 28
סמלים, התרעות,	לחצן על גבי המסדר	אפליקציה, יציאה מן
הודעות..... 228, 227, 226	החכם..... 47, 42, 31	המערכת..... 154
עוצמת סוללה, מחוון..... 48	מדבקה דביקה..... 46, 44	אפליקציה, מידע אודות
עריסת טעינה..... 16	מדריך מיקום,	המוצר..... 153, 151
פרופיל זמני..... 104	עוצמת אות..... 79, 45	אפליקציה, שימוש..... 59
קישור, מסדר חכם	מידע FCC..... 308	אפס מסדר חכם..... 192, 123
עם חיישן..... 36	מכשיר נייד..... 61, 27	אתחל Bluetooth..... 191
רמות יעד..... 84	מכשיר נייד, שעון Apple..... 155	גרף מגמה..... 78
שיוך, מסדר חכם	מסך הסוכר שלי..... 59, 34	דוחות..... 144, 79
ומכשיר נייד..... 191, 31, 28	79, 62	הגדרות, אפליקציה..... 79, 28
שנאי מתח..... 26	מערכת ניהול	91, 80
תפריט..... 79	נתונים (DMS)..... 147	הגדרת נמנום..... 94
Bluetooth..... 307, 79	מצב 'נא לא להפריע'..... 102	הודעות..... 174, 133, 108
Bluetooth, אתחול..... 191	מצב ניתן לגילוי..... 193, 191, 31	המעגל שלי..... 178, 150, 149
Eversense DMS..... 147	מרכיבי המערכת..... 10	התרעות..... 88, 86, 82, 79
Eversense NOW..... 283	מסדר חכם, אודות..... 16, 10	111, 109, 108, 107, 94
MRI, דימות תהודה	מסדר חכם, אפס..... 192, 123	התרעות והודעות, שעון
מגנטית..... 16, 15	מסדר חכם, הפעלה/כיבוי..... 47	אפל..... 158
RF, תקשורת תדירות רדיו..... 307	מסדר חכם, הצמדה..... 44	חיישן..... 184
USB, יציאה..... 25		חיישן, אודות..... 187, 184, 10
USB, כבל..... 25		





:Basic UDI/DI

- 081749102FG3500T8 :ערכת משדר חכם: Eversense E3 -
- 081749102FG6400TQ :ערכת מדבקות דביקות: Eversense E3 -
- 081749102FG6501TX :עריסת טעינה: Eversense E3 -
- 081749102FG5101T4 :iOS אפליקציה לנייד :Eversense E3 -
- 081749102FG5301TE :אפליקציה לנייד אנדרואיד: Eversense E3 -
- 081749102FG5200T7 :DMS Eversense -
- 081749102FG5400TH :iOS אפליקציה לנייד NOW Eversense -
- 081749102FG5401TK :אפליקציה לנייד אנדרואיד: Eversense NOW Eversense -

Call 04-6175390 for Customer Support.

Distributed by:

DYN Diagnostics Ltd.  
 7 Ha'eshel St. P.O. Box 3063  
 Caesarea Industrial Park 3079504, Israel  
 Phone: 04-6175390  
 Email: patient.care@dyn.co.il

**שם הרישום באמ"ר:**

מערכת לניטור סוכר רציף Eversense E3  
 Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring System  
**מס' רישום:** 2660816

**שם היצרן וכתובתו:** סנסאוניקס, אינק. סנקה מדווס  
 פארקווי 20451, ג'רמנטאון, מרילנד 20876-7005, ארה"ב

**פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיץ בישראל:**

דין דיאגנוסטיקה בע"מ  
 רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504  
 04-6175390  
 patient.care@dyn.co.il

התקשר אל 04-6175390 עבור שירות לקוחות.

**Emergo Europe**  
 Westervoortsedijk 60  
 6827 AT Arnhem  
 The Netherlands



**Senseonics, Inc.**

20451 Seneca Meadows Parkway  
 Germantown, MD 20876-7005 USA  
[global.eversensediabates.com](http://global.eversensediabates.com)

פטנטים:

[www.senseonics.com/products/patents](http://www.senseonics.com/products/patents)



(241) LBL-4202-43-001\_REV\_J

