


eversense^{E3}

دليل المستخدم

دليل لاستخدام نظام مراقبة الجلوكوز
المستمرة E3 Eversense

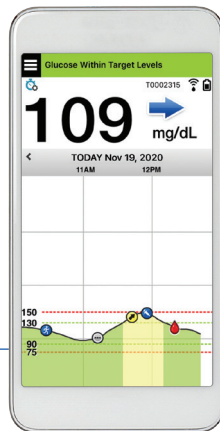

تطبيق الهاتف المحمول



المستشعر
جهاز الإرسال الذكي



علامة Eversense E3 التجارية

إن شعارات Eversense E3، وEversense E3 Continuous Glucose Monitoring، وEversense E3 CGM، وEversense E3 Sensor، وEversense E3 Smart Transmitter، وEversense App، وشعار Eversense E3، عبارة عن علامات تجارية مملوكة لشركة Senseonics, Incorporated. الماركات الأخرى ومنتجاتها هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعنيين.

المحتويات

23	3. بدء التشغيل.....	6	قاموس المصطلحات.....
24	شحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك	8	1. مقدمة.....
26	الخطوة 1. تنزيل التطبيق وتثبيته	8	المساعدة والدعم
27	الخطوة 2. قم بإعداد التطبيق - إنشاء الحساب	9	مكونات نظام CGM Eversense E3
34	والإقران والإعدادات	12	متطلبات النظام
35	4. ربط المستشعر.....	12	اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية
41	5. ارتداء جهاز الإرسال يوميًا.....	13	أجهزة بدون قيود
42	الاستخدام اليومي	13	الشاشة المكسورة أو الزر المكسور
43	تثبيت جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر الذي تم إدخاله	13	تعديلات الجهاز
46	تشغيل جهاز الإرسال الذكي وإيقاف تشغيله	13	دواعي الاستخدام
47	العناية بجهاز الإرسال الذكي وصيانته	13	معلومات السلامة الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
47	مؤشر البطارية	14	موانع الاستعمال
48	مؤشرات LED للحالة	15	ما الموجود في هذه العبوة
49	6. معايرة النظام.....	15	كيفية استخدام دليل المستخدم هذا
51	مراحل المعايرة	16	2. المزايا والمخاطر.....
54	كيفية المعايرة	18	المخاطر والآثار الجانبية
		19	تحذيرات
		21	تنبيهات

1069. أوصاف التنبيه	587. استخدام التطبيق
108	Alert History	59	إدارة حساب Eversense
110	أوصاف التنبيهات وإجراءاتها	60	فحص إعدادات جهازك المحمول
13610. Event Log	61	تعرف على شاشة "My Glucose"
138	الجلوكوز	64	أسهم الاتجاهات
139	الوجبات	65	فهم قرارات العلاج مع نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة
140	الأنسولين	67	تناقش مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك
141	الصحة	69	اتخاذ قرارات العلاج باستخدام Eversense E3
142	التمارين	71	أسهم الاتجاه وقرارات العلاج فيما يخص Eversense E3
14311. Reports	73	ماذا يجب أن تفعل
144	الملخص الشكلي الأسبوعي	77	الرسم البياني للاتجاه
145	الرسم البياني الدائري للجلوكوز	78	خيارات القائمة
145	إحصائيات الجلوكوز	798. تخصيص إعداداتك
14612. مشاركة البيانات	81	ضبط مستويات تنبيه الجلوكوز
	برنامج (Eversense Data Management)	83	ضبط مستويات الجلوكوز المستهدفة
146	Software (DMS)	85	ضبط التنبيهات التنبيهية
146	Share My Data	87	ضبط تنبيهات معدل التغيير
147	المزامنة	89	تعيين تذكيرات المعايرة اليومية
148	My Circle	90	ضبط معلومات النظام
149	Application Sharing	91	إعادة ربط المستشعر
		93	ضبط الأصوات
		94	إعداد تجاوز الجلوكوز المنخفض
			إعداد فصل جهاز الإرسال
		100	Transmitter Disconnect
		103	ضبط الملف الشخصي المؤقت

197	قراءات الجلوكوز	13. معلومات المنتج والمعلومات العامة على التطبيق	150
198	اتخاذ قرارات العلاج	صورة الملف الشخصي	151
199	أسهم الاتجاهات	تسجيل الخروج	153
199	التطبيق		
201	المستشعر	14. عرض بيانات E3 Eversense	
203	الأحداث	على ساعة Apple Watch	154
203	المزامنة	التنبهات والإشعارات المعروضة على ساعة	
204	الاختصارات	Apple Watch	157
205	19. أداء الجهاز	15. My Circle	177
205	أداء الدراسة السريرية	المراقبة عن بُعد باستخدام نظام E3 Eversense CGM	
	دقة E3 Eversense بالنسبة إلى قيم	وتطبيق Eversense NOW	177
207	YSI دراسة PROMISE		
217	عمر المستشعر	16. حول المستشعر	183
218	السلامة	خطوات الإدخال	184
219	20. المواصفات الفنية	خطوات الإخراج	185
219	المستشعر	17. السفر	186
220	جهاز الإرسال الذكي	18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها	187
221	مصدر الإمداد بالطاقة والشاحن	جهاز الإرسال الذكي	187
221	كابل USB* للشحن والتنزيل	بطارية جهاز الإرسال الذكي والشحن	189
222	المعايير الكهربائية والخاصة بالسلامة	الاتصال مع جهاز الإرسال الذكي	190
	الرموز على تطبيق	المعايرة	193
225	Eversense CGM للجهاز المحمول	التنبهات والإشعارات	195
228	الرموز الموجودة على العبوة والأجهزة		
231	الضمان المحدود لجهاز إرسال E3 Eversense الذكي		

305إشعارات قانونية

305	إشعار قانوني خاص بشركة Apple
305	إشعار قانوني خاص بشركة Google
305	معلومات حول Bluetooth®
305	علامة Bluetooth® التجارية
306	معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية
306	توجيه المعدات اللاسلكية

307الفهرس

233Eversense DMS .21

233	مقدمة
234	بدء التشغيل
248	التقارير الإضافية
265	الإعدادات
265	الجلوكوز
269	جهاز الإرسال
269	تحميل بيانات الجهاز
276	Data Share
276	مشاركة البيانات مع عيادتك
279	Help

281Eversense NOW .22

	المراقبة عن بُعد باستخدام نظام Eversense CGM
281	وتطبيق Eversense NOW
284	استعمال تطبيق Eversense NOW
286	الانضمام إلى Eversense Circle
288	الدعوة إلى Circles
292	القائمة الرئيسية
294	رؤية بيانات CGM

قاموس المصطلحات

تنبيه يحذرك التنبيه من أن هناك موقفًا يحتاج إلى انتباهك وبنبغي أن تستجيب/تتخذ إجراءً مناسبًا.

المزامنة التلقائية عند تشغيل هذه الميزة في تطبيق Eversense للهاتف المحمول، ستتم مزامنة بيانات الجلوكوز وإعداداته تلقائيًا في Eversense DMS كل ساعتين.

جلوكوز الدم قيمة الجلوكوز التي تم الحصول عليها من اختبار وخز الإصبع.

جهاز قياس الجلوكوز بالدم جهاز متوفر تجاريًا يُستخدم لقياس الجلوكوز باستخدام عينة دم من وخز الإصبع.

Bluetooth® اسم علامة تجارية لتقنية شبكات لاسلكية تستخدم ترددات اللاسلكي (RF) قصيرة الموجات للاتصال بالأجهزة المحمولة والأجهزة الإلكترونية اللاسلكية الأخرى.

المعايرة قراءة جلوكوز الدم من عينة وخز إصبع تم إدخالها إلى تطبيق Eversense App للتحقق من دقة النظام. مع نظام Eversense E3، توجد مرحلتان: مرحلة التهيئة المطلوب خلالها 4 اختبارات بوخز الإصبع ومرحلة المعايرة اليومية المطلوب خلالها إجراء اختبار واحد بوخز الإصبع مرتين يوميًا.

CGM مراقبة الجلوكوز المستمرة مراقبة مستويات الجلوكوز لديك باستمرار من السائل الخلالي كل عدة دقائق.

موانع الاستعمال حالة أو ظرف ينبغي فيه على الشخص عدم استخدام الجهاز.

CT التصوير المقطعي المحوسب

وضع عدم الإزعاج (DND في تطبيق Eversense App)

عند تمكين هذا الوضع، سيتوقف تطبيق الهاتف المحمول عن عرض التنبيهات غير الحرجة، وسيتوقف جهاز الإرسال الذكي

عن تقديم إشعارات بالذبذبة للتنبيهات غير الحرجة. وسيستمر تقديم التنبيهات الحرجة. تحتوي الكثير من الأجهزة المحمولة على "وضع عدم إزعاج" منفصل. راجع تعليمات الشركة المنتجة للاطلاع على المزيد من المعلومات.

التداخل الكهرومغناطيسي مجال طاقة قوي تولده الأجهزة الكهربائية أو المغناطيسية.

EULA اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي

تطبيق Eversense App تطبيق برمجي مثبت على جهاز محمول ويُستخدم في عرض بيانات الجلوكوز الخاصة بمراقبة الجلوكوز المستمرة التي يتم إرسالها من جهاز الإرسال الذكي.

تطبيق عميل Eversense تطبيق على الحاسوب المكتبي يتيح لمستخدمي Eversense تحميل البيانات الموجودة على جهاز الإرسال الذكي لديهم إلى نظام إدارة البيانات باستخدام كابل USB.

برنامج Eversense Data Management System (DMS)

تطبيق يعتمد على الإنترنت متوافق مع تطبيق Eversense App حيث يتم تخزين بيانات الجلوكوز ويمكن استعراضها.

Eversense NOW تطبيق هاتف محمول للمراقبة عن بُعد يتيح لك إمكانية مشاركة بيانات الجلوكوز الخاصة بك مع أشخاص آخرين.

FAQ الأسئلة المتكررة

مزود الرعاية الصحية أخصائي رعاية طبية مؤهل أكمل بنجاح برنامج تدريب إدخال Eversense E3 CGM وإزالته، وقرأ إرشادات إدخال وإزالة مستشعر مراقبة الجلوكوز المستمرة (Eversense E3 CGM) وفهمه جيدًا.

قراءة "HI" تشير إلى أن قراءة مستشعر الجلوكوز أعلى من 400 mg/dL.

ارتفاع سكر الدم نوبة من ارتفاع الجلوكوز بالدم.

انخفاض سكر الدم نوبة من انخفاض الجلوكوز بالدم.

السائل الخلالي (ISF) السائل الموجود بين الخلايا في الجسم. يقيس Eversense E3 CGM الجلوكوز في عينة من السائل الخلالي، مقابل الجلوكوز في عينة دم مأخوذة عن طريق وخز الإصبع.

جهاز بدون قيود جهاز (iPhone أو iPod) تم تعديله لإزالة عناصر التحكم والقيود التي وضعتها الشركة المنتجة الأصلية.

LED صمام ثنائي باعث للضوء

المستشعر المرتبط مستشعر متصل بجهاز إرسال ذكي.

قراءة "LO" تشير إلى أن قراءة مستشعر الجلوكوز أقل من 40 mg/dL.

الجهاز المحمول جهاز محمول باليد يعتمد على نظام تشغيل محمول يقوم بتشغيل تطبيق Eversense App ويتصل بجهاز الإرسال الذكي.

mg/dL ملليجرام في الديسيلتر، وحدة قياس تبيين تركيز مادة معينة في كمية معينة من السائل. في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتم عرض نتائج اختبارات الجلوكوز بوحدة mg/dL مما يوضح مقدار الجلوكوز في الدم عند استخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم، أو يوضح مقدار الجلوكوز في السائل الخلالي عند استخدام بعض نظم مراقبة الجلوكوز المستمرة مثل نظام Eversense E3 CGM.

mmol/L ملليمول لكل لتر، وحدة قياس تبيين تركيز مادة معينة في كمية معينة من السائل. في العديد من البلدان، يتم عرض نتائج اختبارات الجلوكوز بوحدة mmol/L مما يوضح مقدار الجلوكوز في الدم عند استخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم، أو يوضح مقدار الجلوكوز في السائل الخلالي عند استخدام بعض نظم مراقبة الجلوكوز المستمرة مثل نظام Eversense E3 CGM.

MRI التصوير بالرنين المغناطيسي

السلامة في مجال الرنين المغناطيسي ضمن شروط محددة

عبارة عن عنصر يوضح مجال السلامة في بيئة الرنين المغناطيسي ضمن شروط محددة، تشمل شروطاً للمجال المغناطيسي الثابت، والحقول المغناطيسية المتدرجة المتغيرة بمرور الوقت، ومجالات التردد اللاسلكي.

أسهم معدل التغير/الاتجاه مؤشرات اتجاه التغيير وسرعته في مستويات الجلوكوز في دمك.

المراقبة عن بُعد ميزة اختيارية تتيح لك إمكانية دعوة آخرين إلى الاطلاع على بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بك باستخدام Eversense NOW، وهو تطبيق منفصل للأجهزة المحمولة يتم تنزيله على جهاز محمول متوافق.

المستشعر جهاز يتم إدخاله تحت الجلد لقياس مستويات الجلوكوز في السائل الخلالي باستمرار.

الجلوكوز من المستشعر قيمة الجلوكوز التي تم الحصول عليها من مستشعر Eversense.

إعداد الغفوة يُستخدم لضبط معدل تكرار تنبيهه.

تحت الجلد يقع تحت البشرة.

جهاز الإرسال الذكي جهاز قابل لإعادة الاستخدام يتم ارتداؤه من الخارج فوق المستشعر الذي تم إدخاله ويزود المستشعر بالطاقة ويرسل معلومات الجلوكوز إلى الجهاز المحمول لعرضها في تطبيق Eversense App.

مرحلة الإحماء الفترة التي يحتاج إليها المستشعر للضبط بعد إدخاله وقيل عمليات المعايرة.

1. مقدمة

يستعرض هذا القسم كيفية استخدام هذا الدليل ويصف نظام Eversense E3 CGM الجديد الخاص بك، بما في ذلك مكوناته والغرض المقصود منه.

تهانينا لحصولك على تقنية Eversense E3 CGM لمساعدتك في إدارة مرض السكري الذي تعاني منه. يستهدف نظام Eversense E3 CGM قياس مستويات الجلوكوز باستمرار لما يصل إلى 180 يوماً بعد إدخال المستشعر. وتُرسل معلومات الجلوكوز التي جمعها النظام إلى جهازك المحمول تلقائياً. ويجب أن تتصل بمزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد لإدخال المستشعر وإزالته.

المساعدة والدعم

يرجى مراجعة دليل المستخدم هذا مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك. لطرح المزيد من الأسئلة حول منتج Eversense E3 واستكشاف مشاكله وإصلاحها، اتصل بالرقم المجاني لدعم العملاء في الولايات المتحدة على الرقم (844-736-7348) 844-SENSE4U. ومن خارج الولايات المتحدة، يمكنك الاتصال بالموزع المحلي أو زيارة الموقع الإلكتروني <https://global.eversenseddiabetes.com> لتحديد موقع الموزع المحلي. للاطلاع على أحدث إصدارات دليل المستخدم هذا، تفضل بزيارة <https://global.eversenseddiabetes.com>.

مكونات نظام Eversense E3 CGM

يتضمن النظام (1) مستشعر صغير يتولى مزود الرعاية الصحية إدخاله تحت الجلد و(2) جهاز إرسال ذكي قابل للإزالة يتم ارتداؤه فوق المستشعر و(3) تطبيق للجهاز المحمول لعرض قراءات الجلوكوز.



المستشعر



جهاز الإرسال الذكي

مستشعر Eversense E3

يتم إدخال المستشعر تحت الجلد (أعلى الذراع) وقياس الجلوكوز في السائل الخلالي لما يصل إلى 180 يومًا. ثم يحسب جهاز الإرسال الذكي مستويات الجلوكوز هذه ويرسلها إلى التطبيق.

جهاز إرسال Eversense E3 الذكي


يتم ارتداء جهاز الإرسال الذكي القابل للإزالة خارجيًا فوق المستشعر ويقوم بتشغيل المستشعر. ويرسل بيانات الجلوكوز لاسلكيًا (عبر تقنية Bluetooth) إلى تطبيق الجهاز المحمول. كما يقدم جهاز الإرسال الذكي تنبيهات مبنية على الجسم بناء على إعدادات الجلوكوز التي تختارها. يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن وهو قابل لإعادة الاستخدام لمدة تصل إلى عام.

تطبيق Eversense App

تطبيق Eversense App عبارة عن تطبيق برمجي يعمل على جهاز محمول (مثل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي) ويعرض بيانات الجلوكوز بعدة طرق. كما يقدم تنبيهات بناء على إعدادات الجلوكوز التي تختارها.



Android

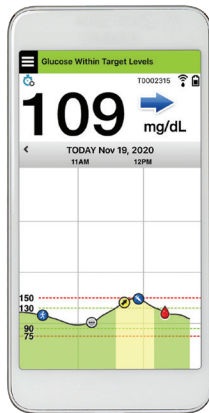

iOS

سيختلف شكل شاشات تطبيق Eversense App على حسب طراز جهازك المحمول و/أو نظام تشغيله. أدرجنا بعض الأمثلة على هذه الاختلافات في دليل المستخدم هذا. تأكد من أن جهازك المحمول يستخدم أحدث نظام تشغيل، والمدرج كنظام تشغيل متوافق على موقعنا الإلكتروني <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>

مهم: لكي تستخدم نظام Eversense E3 CGM، يجب أن تكون على علم بتنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة واستخدامها على جهازك المحمول. يتم إرسال البيانات من جهاز إرسال Eversense E3 الذكي لاسلكيًا عبر تقنية Bluetooth. اقرأ بعناية التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا لتنزيل تطبيق Eversense للأجهزة المحمولة وتنبيته وإقران جهازك المحمول مع جهاز الإرسال الذكي. إذا كان هناك أي شيء لا تفهمه في دليل المستخدم هذا، فيرجى الاتصال بموزعك المحلي.

الرقعات اللاصقة للاستخدام لمرة واحدة يوميًا مشمولة أيضًا كجزء من النظام وسيوفرها لك مزود رعايتك الصحية بعد إدخال المستشعر. الرقعة لها جانب لاصق من الأكريليك يلتصق بالجانب الخلفي في جهاز الإرسال الذكي وجانب لاصق من السيليكون يلتصق بالجلد.

نظرة عامة على نظام E3 Eversense

- مطلوب نظام منفصل لمراقبة جلوكوز الدم (لا تقدمه شركة Senseonics) لمعايرة نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة ولاتخاذ قرارات العلاج ضمن ظروف معينة. اقرأ بندق فهم قرارات العلاج مع نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة. عند استخدام هذه المكونات بالشكل الملائم، فإنها تعمل معًا لتساعد في ضمان حصولك على مراقبة الجلوكوز المستمرة لما يصل إلى 180 يومًا.
- لضمان حصولك على قراءات الجلوكوز المستمرة والمعلومات الأخرى، اتبع نصائح الاستخدام اليومي هذه:
- ✓ قم بارتداء جهاز الإرسال الذكي الخاص بك طوال الوقت باستثناء وقت الشحن.
 - ✓ جهاز الإرسال الذكي مقاوم للماء حتى عمق متر واحد (3.2 أقدام) لمدة 30 دقيقة. سيؤدي تعريض جهاز الإرسال الذكي لظروف بخلاف هذه إلى التلف وإلغاء ضمانك.
 - ✓ احرص على أن يحتوي جهاز الإرسال الذكي على ما يكفي من طاقة البطارية طيلة الوقت.
 - ✓ قم بإجراء اختياري معايرة على جهاز قياس الجلوكوز بالدم كل يوم عندما يُطلب منك ذلك.
 - ✓ انتبه للتنبيهات والإشعارات التي تتلقاها من جهاز الإرسال الذكي الخاص بك وجهازك المحمول.
 - ✓ استبدل الرقعة اللاصقة الموجودة على جهاز الإرسال الذكي الخاص بك يوميًا.
 - ✓ يمكنك إزالة جهاز الإرسال الذكي من أعلى الذراع في أي وقت إلا أثناء المعايرة. تذكر أنه لا يتم جمع أي بيانات إذا لم يكن جهاز الإرسال الذكي متصلًا بالمستشعر. عندما تعيد جهاز الإرسال الذكي إلى موضع المستشعر، ستستغرق إعادة اتصال المستشعر وظهور قراءات الجلوكوز ما يصل إلى 10 دقائق في التطبيق.
 - ✓ عندما لا يكون جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول ضمن نطاق بعضهما البعض، يتم تخزين أي بيانات جمعها جهاز الإرسال الذكي وإرسالها إلى التطبيق عندما يعود الجهاز المحمول وجهاز الإرسال الذكي إلى النطاق مرة أخرى.
 - ✓ من الأمان بالنسبة لك أن ترتدي المستشعر وجهاز الإرسال الذكي أثناء مرورك عبر أجهزة كشف المعادن في المطارات. في أثناء الطيران، يعمل جهاز الإرسال الذكي مثل أي جهاز آخر بتقنية Bluetooth. احرص على اتباع إرشادات السلامة المحددة التي تفرضها شركة الطيران.

بعض ميزات نظام Eversense E3 CGM:

- اتصال لاسلكي بالمستشعر وجهاز الإرسال الذكي والتطبيق.
- ارتداء المستشعر لمدة طويلة أعلى الذراع لما يصل إلى 180 يوماً.
- تنبيهات عند الوصول إلى مستويات تنبيه الجلوكوز المنخفضة أو المرتفعة (انخفاض سكر الدم أو ارتفاع سكر الدم) المحددة مسبقاً.
- تنبيهات تنبؤية تتيح لك إمكانية المعرفة قبل الوصول إلى مستويات تنبيه الجلوكوز المنخفضة أو المرتفعة المحددة مسبقاً.
- استخدام جهاز محمول (مثل الهاتف الذكي) لعرض قراءات الجلوكوز.
- تنبيهات مذبذبة على الجسم باستخدام جهاز الإرسال الذكي حتى عندما لا يكون الجهاز المحمول قريباً.
- يقدم قراءات ضمن نطاق 400 mg/dL - 40 كل 5 دقائق.
- أسهم اتجاهات توضح ما إذا كانت قيم الجلوكوز ترتفع أم تنخفض لديك ومدى سرعة ذلك.
- الرسومات البيانية والإحصاءات التي توضح نتائج الجلوكوز بتنسيقات سهلة الفهم.
- جهاز إرسال ذكي قابل للإزالة وإعادة الشحن.
- إمكانيات إدخال أحداث (مثل الوجبات والتمارين والأنسولين).
- يخزن بيانات الجلوكوز في التطبيق وعلى جهاز الإرسال الذكي.
- يوفر إمكانية المراقبة عن بُعد لأشخاص آخرين باستخدام تطبيق الأجهزة المحمولة Eversense NOW Mobile App.

متطلبات النظام

- نظام Eversense E3 CGM.
- هاتف ذكي متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام Android أو Apple iPhone® أو iPod® أو iPad® المجهزة بتقنية Bluetooth Smart (أو Bluetooth Low Energy). كما يعمل تطبيق Eversense مع Apple Watch®.
- للاطلاع على قائمة بالأجهزة المتوافقة وأنظمة التشغيل، يرجى الانتقال إلى الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com/compatibility>.
- تطبيق Eversense App الذي تم تنزيله إلى جهازك المحمول من متجر التطبيقات Apple App Store أو Google Play™.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية

يخضع استخدام Eversense لشروط وأحكام أحدث اتفاقية ترخيص للمستخدم النهائي من Eversense وسياسة الخصوصية لدى Eversense. يتم تحديث هذه المستندات من حين لآخر ويتم نشرها على <https://global.eversenseddiabetes.com>.

أجهزة بدون قيود

لا تستخدم تطبيقات Eversense على أجهزة iPhone أو iPod التي بدون قيود. حيث لا توفر الأجهزة بدون قيود مستوى مقبولاً من الأمان للمستخدم وهي غير معتمدة للاستخدام من شركة Senseonics.

الشاشة المكسورة أو الزر المكسور

إذا كانت شاشة جهازك المحمول مكسورة أو إذا كانت الأزرار لا تعمل، فقد لا تتمكن من استخدام نظام Eversense E3 الخاص بك وقد تفتك أحداث انخفاض الجلوكوز أو ارتفاعه.

تعديلات الجهاز

لا تقم بتعديل نظام Eversense E3 CGM للاستخدام مع المنتجات أو الملحقات أو الأجهزة الطرفية غير المجهزة أو المعتمدة خطياً من شركة Senseonics. تلغي التعديلات غير المصرح بها ضمان جهاز الإرسال، وقد تؤثر على أداء النظام.

دواعي الاستخدام

يوصف نظام Eversense E3 CGM لقياس مستويات الجلوكوز باستمرار لدى البالغين (18 عاماً فأكثر) المصابين بالسكري لما يصل إلى 180 يوماً. يوصف النظام للاستخدام من أجل استبدال قياسات جلوكوز الدم بوخز الإصبع، فيما يخص قرارات علاج مرضى السكري. يهدف النظام إلى:

- توفير قراءات جلوكوز في الوقت الفعلي.
- توفير معلومات حول اتجاه الجلوكوز.
- توفير تنبيهات لاكتشاف وتوقع نوبات انخفاض الجلوكوز بالدم (انخفاض سكر الدم) وارتفاع الجلوكوز بالدم (ارتفاع سكر الدم).
- المساعدة في التعامل مع السكري.

يمكنك تفسير البيانات التاريخية المأخوذة من النظام للمساعدة في إدخال تعديلات على العلاج. ينبغي أن تستند هذه التعديلات إلى الأنماط والاتجاهات التي تظهر مع الوقت. النظام مخصص للاستخدام الفردي.

معلومات السلامة الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

يمكن فحص المريض المستخدم للجهاز على نحوٍ آمنٍ داخل مساحة رنين مغناطيسي (MR) ذات أنبوبٍ أفقي مغلقٍ تلبيةً للشروط التالية:

- المجال المغناطيسي الثابت يبلغ 1.5 تسلا أو 3.0 تسلا.
- أقصى تدرج للمجال المكاني 1900 جاوس/سم ($19 \geq$ تسلا/م).
- أقصى نظام رنين مغناطيسي مسجل، معدل الامتصاص النوعي (SAR) المتوسط للجسم بالكامل يبلغ 4 وات/كجم (وضع التشغيل المراقب بالمستوى الأول) لمدة 15 دقيقة من المسح المتواصل، أو معدل الامتصاص النوعي يبلغ 2 وات/كجم لمدة 30 دقيقة من المسح المتواصل.

في ظل ظروف المسح المذكورة أعلاه، من المتوقع أن تحقق نتائج الاختبارات غير السريرية المشيرة إلى مستشعر E3 Eversense أقصى ارتفاع في درجة الحرارة أقل من 5.4 درجات مئوية.

في الاختبارات غير السريرية، تحدث عيوب التصوير بواسطة جهاز يمتد إلى 72 مم (2.83 بوصة) تقريبًا من مستشعر E3 Eversense عند التصوير بتتابع نبضات متدرجة الصدى ونظام رنين مغناطيسي 3T.

لم يُختبر مستشعر E3 Eversense في أنظمة الرنين المغناطيسي التي لا تلبية الشروط أعلاه. وقد يؤدي تعريض مستشعر E3 Eversense لشروط تصوير بالرنين المغناطيسي غير مطابقة للشروط المذكورة أعلاه إلى التسبب في تداعيات محتملة مثل ارتحال الجهاز، أو ارتفاع الحرارة وتلف الأنسجة أو تآكل الجلد.

جهاز إرسال E3 Eversense الذكي غير آمن مع الرنين المغناطيسي ويجب إزالته قبل الخضوع لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي. قبل إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، أخبر مختصي التصوير بالرنين المغناطيسي أن لديك مستشعر E3 Eversense، وجهاز إرسال ذكيًا، واستشر مزود الرعاية الصحية الذي ركب جهاز المستشعر.

للحصول على أحدث إصدارات تصنيفات نظام E3 CGM Eversense، تفضل بزيارة <https://global.eversenseddiabetes.com>، ستحصل على بطاقة زرع دولية من مزود الرعاية الصحية الخاص بك، عند كل عملية إدخال للمستشعر. احتفظ بهذه البطاقة في محفظتك كمرجع.

موانع الاستعمال

يُمنع استعمال النظام مع الأشخاص الممنوعين من التعرض لمادة ديكساميثازون أو أسيئات ديكساميثازون.

لا يتوافق جهاز الإرسال الذكي مع إجراءات (التصوير بالرنين المغناطيسي) (MRI). يتعين ألا يخضع المرضى لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) عند ارتداء جهاز الإرسال الذكي. للاطلاع على معلومات بخصوص المستشعر، يُرجى الاطلاع على معلومات السلامة الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي.

يؤدي المانيتول أو السوربيتول عند إعطائهما في الوريد أو كمواد في محلول إرواء أو محلول غسيل الكلى الصفاقي إلى زيادة تركيز المانيتول أو السوربيتول في الدم مما يسبب قراءات مرتفعة بشكل زائف لنتائج مستشعر الجلوكوز. يُستخدم السوربيتول في بعض المحليات الصناعية ولا تؤثر مستويات التركيز في الوجبات العادية في نتائج مستشعر الجلوكوز.

ما الموجود في هذه العبوة

يحتوي طقم جهاز إرسال Eversense E3 الذكي هذا على ما يلي:



مصدر الطاقة

(سيضمن طقم جهاز الإرسال الذكي الخاص بك قابلاً للجدار يلائم الاستخدام في منطقتك المحلية.)



حامل الشحن



جهاز إرسال Eversense E3 الذكي

تحتوي هذه العبوة أيضاً على دليل المستخدم هذا ودليل مرجعي سريع.

كيفية استخدام دليل المستخدم هذا

يصف هذا الدليل كيفية استخدام نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة. اقرأ الدليل بالكامل قبل استخدام النظام.

- كل التحذيرات أو التنبيهات معلّمة في مربع.
- نصائح المستخدم مسبوقة بالرمز ✓.

2. المزايا والمخاطر

يصف هذا القسم المزايا والتوقعات والمخاطر المرتبطة باستخدام نظام Eversense E3 CGM. يتوافر المزيد من معلومات السلامة من خلال <https://ec.europa.eu/tools/eudamed> (قاعدة البيانات الأوروبية ذات الصلة بالأجهزة الطبية - EUDAMED) في ملخص نظام Eversense E3 CGM للسلامة والأداء (SSCP)، أو بناءً على طلب دعم العملاء. ويرتبط تقرير SSCP بأرقام المعرفات الأساسية Basic UDI-DI لمكون نظام Eversense E3 CGM المدرجة على الغطاء الخلفي من دليل التعليمات هذا.

تساعد مراقبة الجلوكوز المستمرة في التعامل مع السكري والتحكم في الجلوكوز، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة حياتك. تتحقق أفضل النتائج عندما تكون على علم تام بالمخاطر والمزايا وعملية الإدخال ومتطلبات المتابعة ومسؤوليات الرعاية الذاتية. ينبغي عدم إدخال المستشعر لجسمك إذا كنت لا تستطيع تشغيل نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة بالشكل الملائم.

يعمل نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة على قياس الجلوكوز في السائل الخلالي (ISF) بين خلايا الجسم. قد تتسبب الاختلافات الفسيولوجية بين السائل الخلالي والدم المأخوذ من جهاز القياس بوخز الأصبع في اختلافات قياسات الجلوكوز. وتصبح هذه الاختلافات أكثر وضوحًا أثناء أوقات التغيير السريع في جلوكوز الدم (أي، بعد تناول الطعام، جرعة الأنسولين، أو التدريب)، وعند البعض، خلال الأيام القليلة الأولى بعد الإدخال بسبب الالتهاب الذي قد ينتج عن إجراء الإدخال. مستويات الجلوكوز في السائل الخلالي تتأخر عن مستويات الجلوكوز في الدم لعدة دقائق.

مهم: إن لم تتطابق أعراضك مع تنبيهات الجلوكوز وقرائته من نظام Eversense E3 CGM، فيجب إجراء اختبار الجلوكوز بالدم بوخز الإصبع من خلال جهاز قياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرارات العلاج.

قد يتسبب الفشل في استخدام نظام Eversense E3 CGM، وفقاً لتعليمات الاستخدام، إلى تفويت أحداث انخفاض سكر الدم أو ارتفاع سكر الدم، مما قد يتسبب في حدوث إصابة.

يتضمن المستشعر حلقة من السيليكون تحتوي على كمية صغيرة من دواء مضاد للالتهاب (أسيئات ديكساميثازون). لم يحدد ما إذا كانت المخاطر المرتبطة بمادة أسيئات ديكساميثازون القابلة للحقن تسري على حلقة إفراز أسيئات ديكساميثازون داخل المستشعر. تطلق حلقة الإفراز قدرًا صغيرًا من أسيئات ديكساميثازون عندما يتلامس المستشعر مع سوائل الجسم فتعمل على تقليل الاستجابة الالتهابية في الجسم للمستشعر الذي تم إدخاله. كما قد تسبب مادة أسيئات ديكساميثازون الموجودة في الحلقة أحيانًا مناوئة أخرى لم تظهر سابقًا مع الشكل القابل للحقن. للاطلاع على قائمة بالآثار المناوئة المحتملة المرتبطة بأسيئات ديكساميثازون، تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك.

التعديلات غير المصرح بها في المعدات، والاطلاع على المعلومات التي بداخلها بشكل غير ملائم أو "إزالة قيود" نظامك واتخاذ أي إجراءات أخرى غير مصرح بها قد يؤدي إلى تعطل نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة وقد يعرضك للخطر. لا يُسمح بالتعديلات غير المصرح بها في المعدات وتؤدي إلى إلغاء ضمانك.

يجب إبلاغ جهة التصنيع والهيئة المختصة بالولاية العضو الخاصة بك بأي حادث خطير يقع فيما يتعلق باستخدام الجهاز.

المخاطر والآثار الجانبية

لن تقوم التنبيهات والإشعارات الخاصة بالجلوكوز بإصدار إشعار صوتي لك عندما يكون صوت جهازك المحمول مغلقاً. إذا كان النظام لا يستطيع أن يعرض قيمة جلوكوز، فإنه لا يستطيع أيضاً أن يقدم تنبيهات خاصة بالجلوكوز. إذا كنت لا تستطيع أن تشعر بالاهتزاز في جهاز الإرسال الذكي، فقد لا تلاحظ التنبيهات. قد تحتاج إلى عناية طبية في حالة تعرضك لارتفاع الجلوكوز أو انخفاضه دون أن تدرى ذلك. يمكن أن يختلف الجلوكوز المحسوب في النظام قليلاً عن جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك. قد يتسبب هذا في تنشيط تنبيه في وقت مختلف عن وقت تنشيطه لو كانت قيم النظام مطابقة دائماً لقيم جهاز قياس الجلوكوز بالدم.

مهم: إذا لم تقم بقياس الجلوكوز لديك باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم، عندما لا تتسق أعراسك مع قراءات مستشعر الجلوكوز، فقد تفوتك حالة ارتفاع في الجلوكوز أو انخفاضه.

ويجب اتخاذ قرارات العلاج بناءً على مراجعة ما يلي: قيمة مستشعر الجلوكوز، وسهم الاتجاه، والرسم البياني الأحدث لاتجاه الجلوكوز، وتنبيهات/إشعارات النظام. ويجب ألا تقوم باتخاذ قرار العلاج ما لم تضع جميع هذه المعلومات بالاعتبار. فأحرص على التحدث مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك حول عمل الأنسولين، حتى تفهم كيف يمكن لتأثيره على الجلوكوز المساهمة في قرارات العلاج. يتم إدخال المستشعر عن طريق عمل شق صغير ووضعه تحت الجلد. قد يتسبب الغرس في عدوى، أو ألم، أو تهيج الجلد، أو كدمة، أو تغيير لون الجلد أو الضمور. تم الإبلاغ عن حالات دوام وإغماء وغثيان في عدد قليل أثناء الدراسات السريرية، وكانت هناك حالات لكسر المستشعر أو عدم إزالته في المحاولة الأولى. بالإضافة إلى أن اللاصق قد يحدث تفاعلاً أو تهيجاً في الجلد. يجب إبلاغ موفر الرعاية الصحية الخاص بك بأي مشكلة طبية ذات صلة بالإجراء أو استخدام الجهاز. وسيطلب المستشعر إجراء إزالة إضافي في نهاية عمر المستشعر.

- لم يتم اختبار نظام Eversense E3 CGM باستخدام مواضع إدخال بخلاف أعلى الذراع.
- إذا وجدت في أي وقت أن قراءات مستشعر الجلوكوز غير متسقة، فينبغي فحص الجلوكوز لديك باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم.
- قبل اتخاذ قرار علاج، يجب أن تأخذ في الاعتبار قيمة مستشعر الجلوكوز، والرسم البياني للاتجاه، وسهم الاتجاه، وأية تنبيهات من نظام Eversense E3 CGM. وإذا لم يتم عرض سهم الاتجاه، فذلك يعني أن النظام لا يحتوي على بيانات كافية لعرض الاتجاه ومعدل التغيير. ويجب ألا تتخذ قرار علاج بناءً على قيمة مستشعر الجلوكوز فقط.
- إذا كان جهاز الإرسال الذكي لديك تالفًا أو مكسورًا، فلا تستخدمه لأن هذا يمكن أن يشكل خطرًا على السلامة الكهربائية أو عطلًا ويمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية.
- قد تتعارض الملامسة القريبة مع التداخل الكهرومغناطيسي المباشر مع قدرة جهاز الإرسال الذكي على إرسال البيانات إلى جهازك المحمول. ابتعد عن مصدر التداخل الكهرومغناطيسي وتحقق من اتصال جهازك المحمول بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك.
- قد تؤدي المضادات الحيوية من فئة التتراسيكلين إلى خفض قراءات مستشعر الجلوكوز بشكل زائف. فلا تعتمد على قراءات مستشعر الجلوكوز بينما تتناول مجموعة التتراسيكلينات.
- يجب أن تظل الضمادة تغطي الشق لمدة 48 ساعة، حيث إن هذا هو معيار الرعاية المطلوب للسماح بتكوين طبقة مانعة للماء للحماية من حدوث عدوى. فأحرص دائمًا على تغطية موضع الإدخال بضمادة معقمة قبل وضع لاصقة جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر إلى أن يتمائل للشفاء. حيث يمكن أن يؤدي عدم فعل ذلك إلى عدوى في موضع الإدخال.
- يرجى مراجعة دليل المستخدم هذا مع مزود رعايتك الصحية. لطرح المزيد من الأسئلة حول منتج Eversense E3 واستكشاف مشاكله وإصلاحها، اتصل بالرقم المجاني لدعم العملاء في الولايات المتحدة على الرقم (844-736-7348) 844-SENSE4U. ومن خارج الولايات المتحدة، يمكنك الاتصال بالموزع المحلي أو زيارة الموقع الإلكتروني <https://global.eversenseddiabetes.com> لتحديد موقع الموزع المحلي.
- قم دائمًا بمعايرة النظام باستخدام عينة دم بوخز الإصبع فقط. لا تستخدم قراءة جلوكوز الدم من موضع بديل (مثل الساعد أو راحة اليد) لمعايرة النظام.

تحذيرات (تابع)

- لا تقم بإدخال عدة تسريب السوائل أو حقن الأنسولين ضمن نطاق 10.16 سم (4 بوصات) من موضع المستشعر. إذا كان موضع إعطاء الإنسولين يقع ضمن مسافة 10.16 سم (4 بوصات) من موضع المستشعر، فقد يتعارض مع قراءات مستشعر الجلوكوز ويمكن أن يسبب قراءات جلوكوز غير دقيقة.
- اتبع دائماً تعليمات مزود الرعاية الصحية الخاص بك للرعاية بعد إدخال المستشعر أو إخراجها. تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك إذا وقع أي من الأحداث التالية:
- إذا كنت تشعر بألم أو احمرار أو انتفاخ في موضع (مواضع) الشق الجراحي بعد 5 أيام من إدخال المستشعر أو إزالته، أو في حال عدم التئام الشق في غضون 5 إلى 7 أيام.
- إذا كان الجلوكوز في المستشعر منخفضاً جداً (أقل من 40 mg/dL) أو مرتفعاً جداً (أعلى من 400 mg/dL)، فيجب عليك إجراء اختبار جلوكوز الدم بوخز الإصبع قبل اتخاذ قرار العلاج.
- يتطلب نظام Eversense E3 CGM إجراء معايرة لتقديم قراءات دقيقة. ولا تستخدم قراءات CGM لاتخاذ قرارات علاج ما لم تتبع تعليمات المعايرة اليومية.
- لن يوفر نظام Eversense E3 CGM قراءات خلال مرحلة الإحماء التي تستمر لمدة 24 ساعة وحتى تنجح المعايرة الثانية خلال مرحلة التهيئة. وخلال هذا الوقت، يجب عليك مراقبة الجلوكوز لديك باستخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم بالمنزل.
- ستمنع بعض الظروف والتنبيهات المعينة من عرض بيانات الجلوكوز. وخلال هذه الأوقات، يجب عليك استخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم بالمنزل لاتخاذ قرارات العلاج. يجب عليك قراءة قسم التنبيهات والإشعارات بعناية في دليل مستخدم نظام Eversense E3 CGM لفهم هذه الظروف.
- لن تقوم التنبيهات والإشعارات الخاصة بالجلوكوز بإصدار إشعار صوتي لك عندما يكون صوت جهازك المحمول مغلقاً. إذا كان النظام لا يستطيع أن يعرض قيمة جلوكوز، فإنه لا يستطيع أيضاً أن يقدم تنبيهات خاصة بالجلوكوز. إذا كنت لا تستطيع أن تشعر بالاهتزاز في جهاز الإرسال الذكي، فقد لا تلاحظ التنبيهات.
- عندما لا يتم ارتداء جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر، على سبيل المثال أثناء الشحن، لن يوفر نظام Eversense E3 CGM التنبيهات والإشعارات على الجهاز المحمول أو من خلال التنبيهات الاهتزازية من جهاز الإرسال الذكي.
- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه إحدى المواد المستخدمة في المستشعر أو جهاز الإرسال الذكي، والمدرجة ضمن المواصفات الفنية لدليل المستخدم هذا، فلا تستخدم نظام Eversense CGM.

- لا تتبادل أجهزة الإرسال الذكي مع شخص آخر. يمكن ربط كل جهاز إرسال ذكي بمستشعر واحد فقط كل مرة. يجب استخدام النظام من شخص واحد في بيئة المنزل.
- قد تتسبب العلاجات أو الإجراءات الطبية التالية في تلف دائم للمستشعر وخاصة إذا تم استخدامها بالقرب من الجهاز:
 - تفتيت حصى الكلى - لا يوصى بإجراء تفتيت حصى الكلى لمن أدخل لهم مستشعر لأن الآثار غير معروفة.
 - العلاج بالإتفاذ الحراري - لا تستخدم الإتفاذ الحراري لمن أدخل لهم مستشعر. يمكن أن تنتقل طاقة العلاج بالإتفاذ الحراري عبر المستشعر وتتسبب في تلف بالأنسجة في منطقة الإدخال.
 - الكي بالكهرباء - قد يؤدي استخدام الكي بالكهرباء بالقرب من المستشعر إلى تلف في الجهاز. لا تستخدم الكي بالكهرباء بالقرب من المستشعر.
- استخدام الستيرويد - لم يحدد ما إذا كانت المخاطر المرتبطة عادة بمادة أسياتات ديكساميثازون القابلة للحقن تسري على استخدام حلقة إفراز أسياتات ديكساميثازون هذه، وهي جهاز للإطلاق الموضعي تحت التحكم الشديد. يمكن أن تتسبب حلقة أسياتات ديكساميثازون في أحداث مناوئة أخرى غير مذكورة أو لم تظهر سابقاً.
- لا ترتد جهاز الإرسال الذكي أثناء عمليات الفحص الطبي بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية المحوسبة (CT). لتجنب التأثير على النتائج، قم بفك جهاز الإرسال الذكي قبل التعرض لعمليات الفحص الطبي بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية المحوسبة. تأكد من أن مزود رعايتك الصحية لديه معرفة بجهاز الإرسال الذكي.
- ينبغي الربط بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي في يوم الإدخال. يمكن أن يؤدي عدم ربط المستشعر مع جهاز الإرسال الذكي إلى تأخير في تلقي قراءات الجلوكوز.
- إذا كان هناك إحساس بالدفع في المستشعر أو موضع الإدخال أو جهاز الإرسال الذكي، فقم بفك جهاز الإرسال الذكي فوراً وتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المزيد من النصائح. يمكن أن يعني دفع المستشعر وجود عدوى أو عطل في المستشعر.
- لا تحاول استخدام تطبيق Eversense App أثناء تشغيل السيارة.
- ينبغي ألا تتلقى علاجًا بالتدليك بالقرب من موضع إدخال المستشعر. يمكن أن يؤدي العلاج بالتدليك بالقرب من موضع المستشعر إلى إحساس بعدم الراحة أو تهيج في الجلد.

تنبيهات (تابع)

- لا تستخدم إلا مهائئ طاقة التيار المتردد وكابل USB المرفقين مع جهاز الإرسال الذكي، عند شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر إلى إتلاف جهاز الإرسال الذكي مما يمنع استقبال قراءات الجلوكوز بالشكل الصحيح، واحتمالية حدوث حريق، مما قد يؤدي إلى إلغاء الضمان. في حالة تلف مهائئ طاقة التيار المتردد أو كابل USB بجهاز Eversense أو فقد أي منهما، اتصل بفريق دعم العملاء للاستبدال وضمان تشغيل الجهاز بأمان.
- إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن رد الفعل التحسسي للمواد اللاصقة التي تحتوي على السيليكون، فتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك قبل الاستخدام. تخلص من لاصقة Eversense بعد كل استخدام يستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة.
- لا تغيّر وحدة القياس إلا إذا ناقشت الأمر مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك. ففي حالة استخدام وحدة قياس غير صحيحة، قد تفوتك حالة ارتفاع في الجلوكوز أو انخفاضه.
- قد يؤدي إدخال قيم جلوكوز دم غير صحيحة للمعايرة إلى الحصول على قراءات غير صحيحة لمستشعر الجلوكوز، مما قد ينتج عنه تفويت قيم مرتفعة أو منخفضة للجلوكوز.
- اتبع توصيات مزود الرعاية الصحية الخاص بك لإعداد تنبيهات الجلوكوز لديك. إن إعداد تنبيهات الجلوكوز بشكل غير صحيح، قد يؤدي إلى تفويت قيم مرتفعة أو منخفضة للجلوكوز.
- انتبه إلى تنبيهات الجلوكوز التي يقدمها النظام. فقد يؤدي الفشل في الاستجابة الصحيحة للتنبيه إلى تفويت قيم مرتفعة أو منخفضة للجلوكوز.
- لا يحل تطبيق المراقبة عن بعد Eversense NOW Remote Monitoring App محل نظام المراقبة حسب توجيه مزود الرعاية الصحية الخاص بك.
- لم يتم اختبار نظام Eversense E3 CGM على الفئات التالية: الحوامل أو المرضعات، ومن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمصابون بمرض حرج أو المقيمون في المستشفى، ومن يتلقون علاجًا كابتًا للمناعة أو علاجًا كيميائيًا أو علاجًا مضادًا لتخثر الدم، ومن لديهم جهاز مزروع تَشيط آخر، مثل مزيل الرجفان القابل للزرع (يسمح بالأجهزة المزروعة الخاملة مثل دعامات القلب)، والمصابون بأنواع حساسية معروفة أو يستخدمون كورتيكويدات سكرية (باستثناء الأنواع الموضعية أو البصرية أو الأنفية، لكن من دون استثناء الأنواع المستشفقة). لم يتم اختبار دقة النظام في هذه الفئات، وقد تكون قراءات مستشعر الجلوكوز غير دقيقة، مما قد ينتج عنه تفويت قيم جلوكوز منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية.
- تُعتبر ساعة Apple Watch شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense E3 CGM وينبغي عدم استخدامها بدلاً من شاشة Eversense E3 CGM الرئيسية.

3. بدء التشغيل

3

يصف هذا القسم خطوات بدء التشغيل الأولية المطلوبة قبل أن تتمكن من البدء في استخدام نظام Eversense E3 CGM الجديد الخاص بك بشكل يومي. يمكنك إجراء هذه الخطوات قبل أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك بإدخال المستشعر.

لتبدأ، تحتاج إلى ما يلي:

- جهازك المحمول لتنزيل تطبيق Eversense App.
 - اتصال إنترنت لاسلكي.
 - عبوة جهاز إرسال Eversense E3 الذكي التي تتضمن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك ومصدر الإمداد بالطاقة.
- ملاحظة:** إذا لم تتلقَ عبوة جهاز الإرسال الذكي الخاصة بك، فانقل إلى التعليمات المتعلقة بتنزيل تطبيق Eversense App وتثبيته على جهازك المحمول لاحقاً في هذا القسم.
- يمكنك إكمال خطوات بدء التشغيل التالية قبل إدخال مستشعرك لكي تتمكن من التعرف على النظام.

خطواتان سهلتان لبدء التشغيل:


1. قم بتنزيل تطبيق Eversense App إلى جهازك المحمول.
 2. قم بإعداد التطبيق - إنشاء الحساب والإقران والإعدادات.
- بعد أن تتلقى جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، يجب أن يكون مشحوناً بشكل كامل قبل الإقران مع التطبيق.
- ملاحظة:** يتم ضبط جهاز الإرسال الذكي الخاص بك على حالة "السبات" قبل شحنه. عندما تشحن جهاز الإرسال الذكي لأول مرة، تتغير الحالة إلى الحالة النشطة.
- يأتي جهاز الإرسال الذكي الخاص بك بضمان لمدة 12 شهر. وسينبهك الجهاز عندما يتخطى ضمان جهاز الإرسال 365 يوماً.

شحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك

من المهم أن تشحن بطارية جهاز الإرسال الذكي يوميًا لضمان جمع البيانات من المستشعر وإرسالها إلى التطبيق. لا يجمع جهاز الإرسال الذكي المعلومات من المستشعر أو يرسلها إلى التطبيق أثناء الشحن. يمكنك أيضًا أن تشحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك عن طريق توصيل كابل USB بمنفذ USB في جهاز كمبيوتر بدلاً من مهائئ طاقة التيار المتردد. قد يستغرق استخدام جهاز كمبيوتر وقتًا أطول للشحن الكامل لبطارية جهاز الإرسال الذكي.

تنبيه: لا تستخدم إلا مهائئ طاقة التيار المتردد وكابل USB المرفقين مع جهاز الإرسال الذكي، عند شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر إلى إتلاف جهاز الإرسال الذكي مما يمنع استقبال قراءات الجلوكوز بالشكل الصحيح، واحتمالية حدوث حريق، مما قد يؤدي إلى إلغاء الضمان. في حالة تلف مهائئ طاقة التيار المتردد أو كابل USB بجهاز Eversense أو فقد أي منهما، اتصل بفريق دعم العملاء للاستبدال وضمان تشغيل الجهاز بأمان.

2. قم بتوصيل الطرف الصغير من كابل USB بحامل الشحن في منفذ USB.

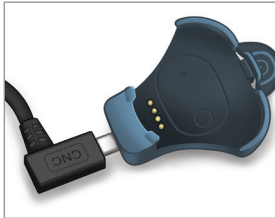


1. قم بتوصيل الطرف القياسي من كابل USB بالمهائئ في منفذ USB.



4. قم بتوصيل المهائئ بمنفذ التيار المتردد.

- بمجرد الشحن بالكامل، يظهر ضوء LED أخضر صغير في الجزء العلوي الأمامي من جهاز الإرسال الذكي (فوق زر الطاقة).
- افصل مصدر الإمداد بالطاقة عن جهاز الإرسال الذكي بعد شحنه بالكامل.
- لتحرير جهاز الإرسال الذكي من حامل الشحن، اسحب اللسان وارفع جهاز الإرسال الذكي من الحامل.

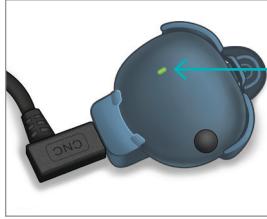

مؤشر مصباح LED
(بضوء باللون الأخضر
أو البرتقالي)

3. قم بمحاذاة الدبابيس الذهبية الأربعة في الجزء السفلي من جهاز الإرسال الذكي مع الدبابيس الذهبية الأربعة في حامل الشحن.

- أزح جهاز الإرسال الذكي إلى مكانه في حامل الشحن.
- بمجرد أن يكون جهاز الإرسال الذكي في موضعه، اضغط عليه للأسفل إلى أن يثبت في مكانه.



تم تصميم التطبيق ليعمل مع جهاز الإرسال الذكي ليتلقى بيانات مستشعر الجلوكوز ويعرضها تلقائيًا.

3. على شاشة التثبيت، اضغط على **Install application** واتبع تعليمات التثبيت.

بعد دقيقة إلى دقيقتين، تأكد من أن الجهاز المحمول يظهر أيقونة تطبيق Eversense App (كما هو موضح جهة اليمين).

"Eversense CGM" Would Like to Send You Notifications


Notifications may include alerts, sounds and icon badges. These can be configured in Settings.

Don't Allow

Allow

ملاحظة: تأكد من تفعيل السماح بالإشعارات "Allow Notifications" من تطبيق Eversense App لتلقي التنبيهات والإشعارات على جهازك المحمول.

2. قم بتنزيل تطبيق Eversense App المجاني من متجر تطبيقات Apple App Store أو من Google Play. ستختلف التنبيهات الخاصة بتثبيت التطبيق بين نظامي التشغيل iOS و Android.

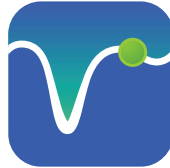

أيقونة تطبيق Eversense

ملاحظة: تأكد من أن جهازك المحمول يستخدم أحدث نظام تشغيل متوافق مع Eversense.

1. حدد الجهاز المحمول الذي ترغب في استخدامه لعرض قراءات الجلوكوز الخاصة بك. في معظم الحالات، سيكون هذا الجهاز هاتفًا ذكيًا.



مهم: تأكد من توافر اتصال إنترنت لاسلكي، وأن الوقت والتاريخ صحيحان على جهازك المحمول، وأن Bluetooth قيد التشغيل (ON) قبل المتابعة.

الخطوة 2. قم بإعداد التطبيق - إنشاء الحساب والإقران والإعدادات

3

بمجرد تنزيل التطبيق، قم بتوصيل التطبيق بجهاز الإرسال الذكي عن طريق إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول

2. بعد أن تقبل الاتفاقية، ستتم مطالبتك بإنشاء حساب وتسجيله باستخدام بريد إلكتروني وكلمة مرور.
 - يجب أن تسجل حسابًا قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول. اضغط على **Create an Account**.

ملاحظة: إذا كان لديك حساب بالفعل ونسيت كلمة مرورك، فيمكنك إعادة تعيينها عبر التطبيق. إذا نسيت البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك، فانقل إلى **Main Menu > About > My Account**

1. ابدأ تشغيل التطبيق عن طريق الضغط على أيقونة تطبيق Eversense App في جهازك المحمول. تظهر الصيغة الكاملة من اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.
 - قم بالرجوع واضغط على **Accept**.


Having read the Privacy Policy, clicking on the "Accept" button I provide my consent for the processing of my health-related data in order to be used by Senseonics to provide and operate the Senseonics Products and Services.

Cancel


Accept

3. أدخل معلومات حسابك، ثم اضغط على **Submit**.
 • اضغط على **Done** للرجوع إلى شاشة Eversense LOGIN.

4. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرورك واضغط على **LOG IN**. سترى شاشة تأكيد. اضغط على **OK**.
 ملاحظة: كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف.

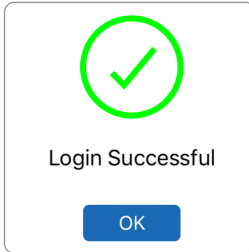


يجب على مستخدمي أجهزة Android تفعيل خدمات الموقع.

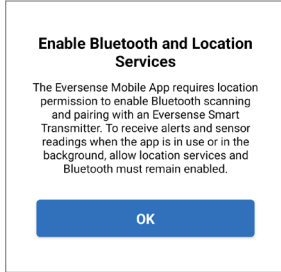


- اضغط على **OK** لتأكيد الإذن
لخدمات الموقع لأن اتصال
Bluetooth مطلوب.

- ثم اضغط على **Allow**
لضمان حصولك على
الإشعارات أثناء استخدام
التطبيق أو تشغيله في الخلفية.


ملاحظة: قد يرى نظام تشغيل Android 12 فما فوق ظهور طلب إذن مختلف.

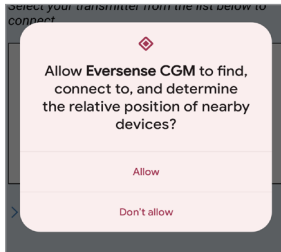

5. عندما تكمل التسجيل وتسجل الدخول، تظهر شاشة **.WELCOME**

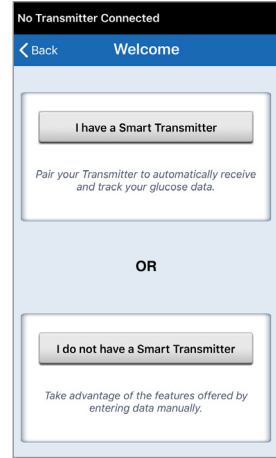


6. اختر خيارًا من اثنين على حسب ما إذا كان لديك جهاز الإرسال الذكي الخاص بك بالفعل أم لا:

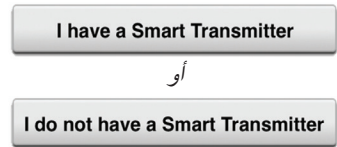

(انتقل إلى الخطوة 12).

9. تظهر الشاشة المنبثقة BLUETOOTH PAIRING REQUEST


- اضغط على **Pair** لإكمال عملية الإقران.
- **ملاحظة:** لا يمكن إقران جهاز الإرسال الذكي إلا مع جهاز محمول واحد كل مرة.

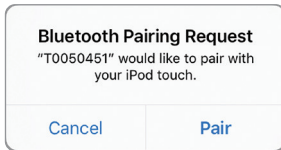

- ## 8. في شاشة **PAIR YOUR TRANSMITTER** يظهر معرف جهاز الإرسال الذكي الذي اكتشفه التطبيق باعتباره **“Not Connected”**. (يتطابق معرف جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع الرقم التسلسلي الموجود على الجانب الخلفي من جهاز الإرسال الذكي).
- اضغط على

Not Connected

لتبدأ عملية الإقران.

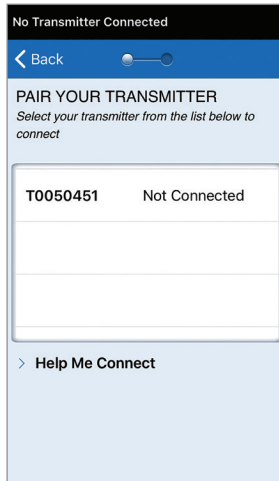

7. أثناء تشغيل جهاز الإرسال الذكي، عندما تظهر شاشة **PAIR YOUR TRANSMITTER**

على جهازك المحمول، اضغط جهاز الإرسال الذكي الخاص بك على الوضع **“Discoverable”** ليعثر الجهاز المحمول على جهاز الإرسال الذكي:


- اضغط على زر تشغيل جهاز الإرسال الذكي ثلاث مرات. تأكد من أن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك ليس متصلاً بمصدر الطاقة.

- سيومض مصباح LED باللون الأخضر والبرتقالي للإشارة إلى أن جهاز الإرسال الذكي في الوضع **Discoverable**.




- **ملاحظة:** إذا ضغطت على زر التشغيل بجهاز الإرسال الذكي ولم يظهر ضوء مصباح LED، فاضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 5 ثوانٍ تقريباً لتشغيله.

11. تظهر شاشة **UNIT OF MEASUREMENT** وتعرض وحدة القياس المعيارية في منطقتك. ستظهر قراءات الجلوكوز الخاصة بك دائماً بوحدة القياس هذه.
- عند تأكيد وحدة القياس، اضغط على **Finish**.

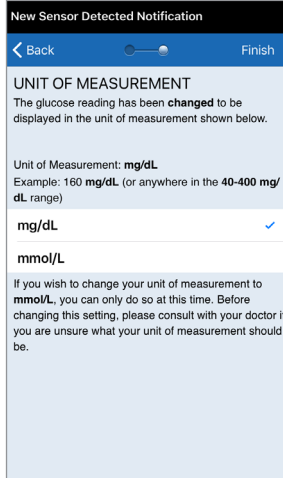





تنبيه: لا تغيّر وحدة القياس إلا إذا ناقشت الأمر مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك.

10. تظهر كلمة **“Connected”** بجوار معرف جهاز الإرسال الذكي بمجرد اكتمال الإقران. سيقدّم جهاز الإرسال الذكي اهتزازات متقطعة إلى أن يرتبط جهاز الإرسال الذكي مع المستشعر الذي تم إدخاله (انظر إدخال المستشعر وربطه).
- اضغط على **Next**.

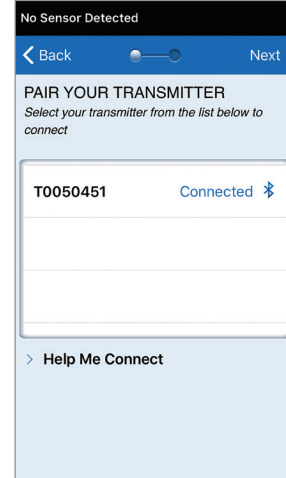


12. انقر فوق شاشات المقدمة التي توفر معلومات حول الأوقات المناسبة لاتخاذ قرارات العلاج من خلال نظام Eversense E3 CGM.

3

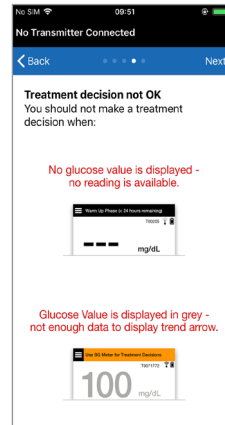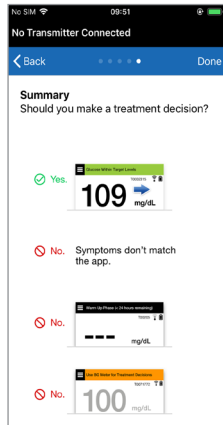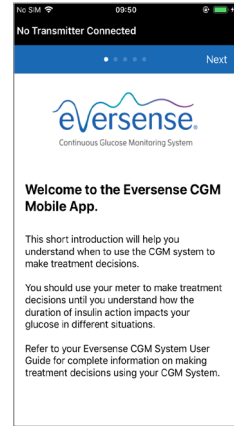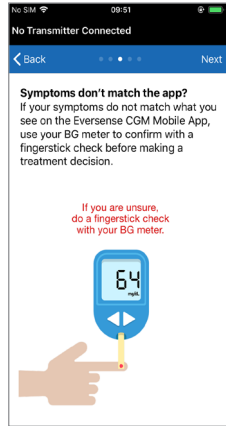

13. بعد ذلك، تظهر شاشة **MY GLUCOSE**.
 لن تحتوي الشاشة على أي بيانات عن الجلوكوز
 لعرضها في هذا الوقت.

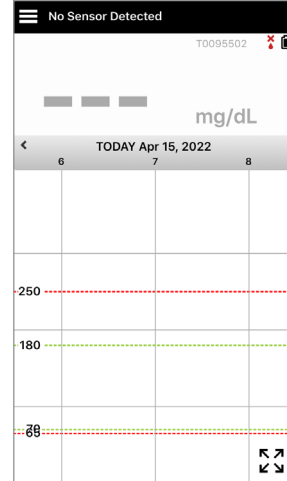

بمجرد أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك بإدخال المستشعر
 واكتمال مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة، يمكنك أن تبدأ المعايير. إذا
 لم يتم حتى الآن إدخال المستشعر الخاص بك، فيمكنك مراجعة دليل
 المستخدم هذا لتتعرف على التطبيق وميزاته.

<p>عندما تكون الأيقونة عبارة عن قطرة دم باللون الرمادي مع علامة X، فذلك يعني عدم اكتشاف جهاز إرسال. وسترى هذه الأيقونة قبل أن تقوم بإقران جهاز الإرسال الذكي مع تطبيق الجهاز المحمول، وخلال أي وقت يتم قطع اتصال وظيفة BLE فيه ما بين جهاز الإرسال الذكي وتطبيق الجهاز المحمول.</p>	
<p>عندما تكون الأيقونة عبارة عن قطرة دم باللون الأحمر مع علامة X، فذلك يعني عدم اكتشاف مستشعر. وسترى هذه الأيقونة قبل أن تقوم بربط المستشعر بجهاز الإرسال لديك، وفي أي مرة يتعذر فيها الكشف عن المستشعر المرتبط من قبل جهاز الإرسال.</p>	
<p>عندما تكون الأيقونة عبارة عن قطرة دم باللون الرمادي أو الأسود مع وجود أشرطة في الأعلى، فذلك يعني أنه قد تم إنشاء اتصال NFC بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي. تشير الأشرطة إلى قوة الاتصال. يتم عرض معلومات قوة الإشارة أيضًا في Main Menu > Placement Guide في Eversense App. تذكير: لا يمكنك الربط بالمستشعر حتى يتم إقران جهاز الإرسال بتطبيق Eversense App.</p>	   

4. ربط المستشعر


4

يصف هذا القسم كيفية ربط المستشعر بجهاز الإرسال الذكي، للمرة الأولى، بعد أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك بإدخال المستشعر. يستطيع مزود الرعاية الصحية الخاص بك فقط إدخال المستشعر. انظر قسم "معلومات عن المستشعر" لمعرفة المزيد.

بمجرد أن يقوم مزود الرعاية الصحية الخاص بك بإدخال المستشعر، يجب ربط جهاز الإرسال الذكي والمستشعر لكي تبدأ مرحلة الإحماء التي تستمر لمدة **24 ساعة**. يمكن ربط جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع مستشعر واحد فقط في كل مرة. لا توجد حاجة لارتداء جهاز الإرسال الذكي خلال مرحلة الإحماء.

مهم: يرجى قراءة هذا القسم بالكامل قبل ربط المستشعر الخاص بك.

يمكنك ربط المستشعر الخاص بك بجهاز الإرسال الذكي في أي وقت يلي إدخال المستشعر وإقران جهاز الإرسال الذكي مع تطبيق Eversense App. ولربط المستشعر، يجب أن يكون جهازك المحمول متصلاً بالإنترنت، ويجب أن يكون جهاز الإرسال كذلك مشحوناً ومشغلاً ومقترناً بجهازك المحمول.

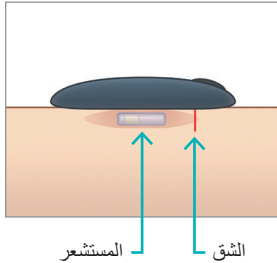


يتم إغلاق موضع الشق باستخدام شرائط Steri Strips، ويتم وضع ضمادة لاصقة، مثل Tegaderm على الجزء العلوي. ومن المهم فهم كيفية وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر لضمان اكتمال الربط. يجب تثبيت جهاز الإرسال الذكي وتوسيطه فوق المستشعر كما هو موضح.


مهم: سيُكتمل مزود الرعاية الصحية المعلومات في بطاقة الزرع في وقت عملية الإدخال. يُرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة في محفظتك واستبدالها عندما تحصل على بطاقة جديدة خلال عملية الإدخال التالية.

1. تأكد من تشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك (انظر استخدام جهاز الإرسال الذكي) وتأكد من أن جهازك المحمول متصل بالإنترنت.


- ضع جهاز الإرسال الذكي مباشرة فوق المستشعر الذي تم إدخاله إلى أن يظهر اتصال على **Placement Guide** في التطبيق، واتركه في موضعه دون الضغط عليه. صفحة Placement Guide موجودة في **.Menu > Placement Guide**

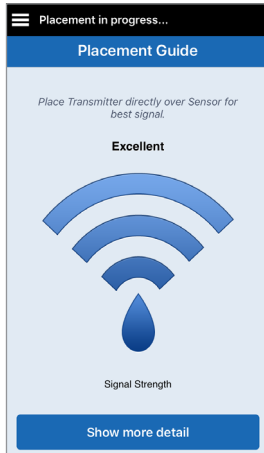

عندما تقوم بربط المستشعر لأول مرة، مع وضع ضمادة Tegaderm فوق موضع الإدخال، من المحتمل أن يكون الشق في وسط ضمادة Tegaderm. وهذا يعني أن المستشعر من المحتمل أن يكون فوق وسط ضمادة Tegaderm.

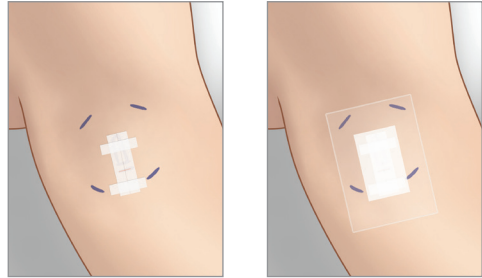

في المرة الأولى التي تقوم فيها بربط المستشعر، لا تستخدم رقعة Eversense اللاصقة على جهاز الإرسال الذكي. عند وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر، يجب أن يكون أعلى بقليل من وسط رقعة Tegaderm.

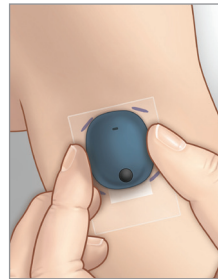



3. لربط جهاز الإرسال الذكي مع المستشعر، اضغط على

New Sensor Link Sensor على شاشة

Detected المنبثقة أو عن طريق الضغط على

Menu > Settings > System > Linked

Sensor ثم اضغط على **Link Detected Sensor**

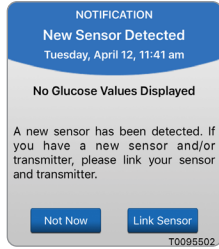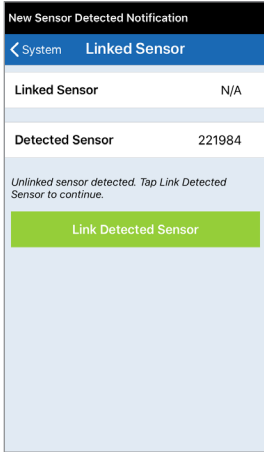

ملاحظة: قد يستغرق ظهور



إشعار اكتشاف مستشعر جديد

”New Sensor Detected“


مدة تصل إلى 5 دقائق.

2. انتقل من صفحة Placement Guide إلى شاشة Main Menu بمجرد أن تتأكد من وجود إشارة.


ملاحظة: الاتصال بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي حساس لاتجاه جهاز الإرسال. إذا كان جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر مباشرة وأشار دليل الوضع إلى عدم وجود اتصال، فحاول تدوير جهاز الإرسال الذكي قليلاً إلى اليسار أو اليمين بحيث يُثبت جهاز الإرسال على وسط المستشعر بشكل رأسي.

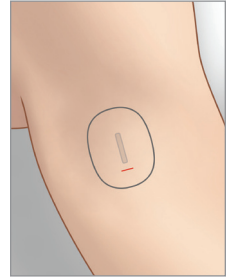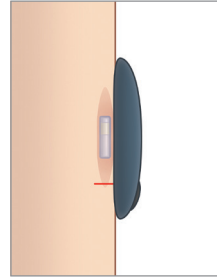


4. ستبدأ عملية الربط. ستظهر إلى جانب كل خطوة علامة اختيار عندما تنتهي. قد يستغرق اكمال العملية مدة تصل إلى 10 دقائق. لا تنزع جهاز الإرسال الذكي من موضع الإدخال لديك قبل أن تظهر علامة الاختيار الثالثة.

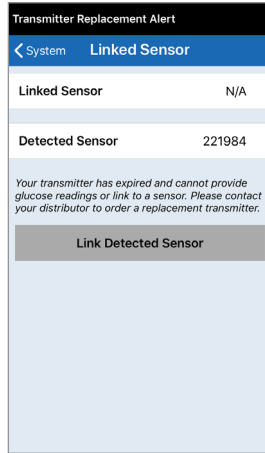


إذا انتهت صلاحية جهاز الإرسال الذكي، فلا يمكن ربطه بالمستشعر

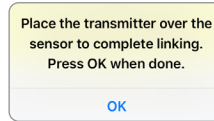

إذا تم نزع جهاز الإرسال الذكي من موضع المستشعر، فسيعرض النظام إشعارًا.

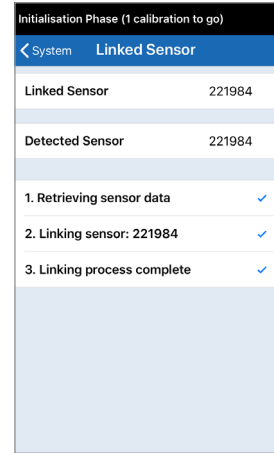

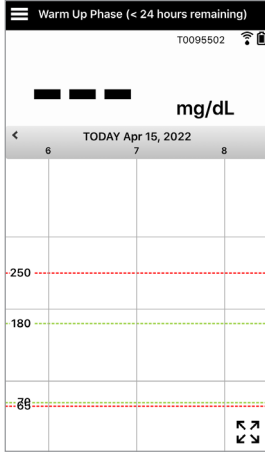


بعد ربط المستشعر، يمكنك إزالة جهاز الإرسال الذكي ووضعه في حامل الشحن لمدة الـ 24 ساعة التالية. انظر قسم استخدام جهاز الإرسال الذكي، للاطلاع على معلومات حول استخدام النظام بعد مرحلة الإحماء.

تنبيه: ينبغي الربط بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي في يوم إدخال المستشعر. يمكن أن يؤدي عدم ربط المستشعر مع جهاز الإرسال الذكي إلى تأخير في تلقي قراءات الجلوكوز.

ملاحظة: يحتاج المستشعر إلى مرحلة إحماء لمدة 24 ساعة ليستقر في جسدك قبل أن يقوم جهاز الإرسال الذكي بجمع قيم الجلوكوز. أثناء مرحلة الإحماء، لا تحتاج إلى ارتداء جهاز الإرسال الذكي. إذا قررت ارتداء جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر في هذا الوقت، فستلقى رسالة على التطبيق تبين أن مرحلة الإحماء جارية. بمجرد اكتمال مرحلة الإحماء، ابدأ تشغيل جهاز الإرسال الذكي وضعه فوق المستشعر باستخدام رقعة Eversense اللاصقة. سيطلب منك النظام إجراء المعايرة باستخدام التطبيق.

تحذير: لن يوفر نظام Eversense E3 CGM قراءات خلال مرحلة الإحماء التي تستمر لمدة 24 ساعة وحتى تنجح المعايرة الثانية خلال مرحلة التهيئة. وخلال هذا الوقت، يجب عليك مراقبة الجلوكوز لديك باستخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم بالمنزل.

مهم: بعد انتهاء مرحلة الإحماء التي تستمر لمدة 24 ساعة، إذا لم يتم تشغيل جهاز الإرسال الذكي وارتداؤه فوق المستشعر، فلن يستطيع النظام توفير قراءات الجلوكوز بعد مرحلة الإحماء.


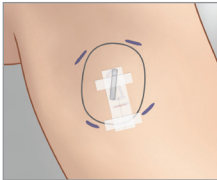


✓ **نصيحة:** قد لا يكون المستشعر عمودياً تماماً على الشق. فإذا واجهت صعوبة في الحصول على إشارة جيدة Good أو ممتازة Excellent في دليل الوضع Placement Guide، فلا تقم بالضغط. وحاول تدوير جهاز الإرسال الذكي قليلاً فوق المستشعر. وانظر حوالي ثانية واحدة، حتى يتم تحديث دليل الوضع بين كل عملية ضبط يتم إجراؤها على موضع جهاز الإرسال فوق المستشعر.

دليل الوضع - الشاشة الرئيسية

ستجد أدناه المستويات المختلفة لقوة الإشارة والتي قد يتم عرضها.

✓ **نصيحة:** لا تحتاج إلى قوة إشارة ممتازة Excellent لربط المستشعر أو استخدام النظام.

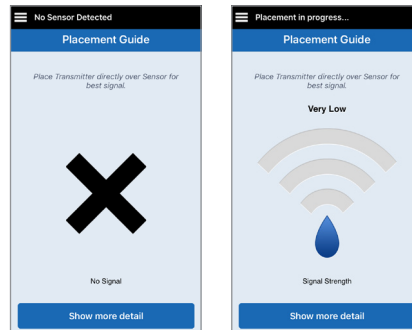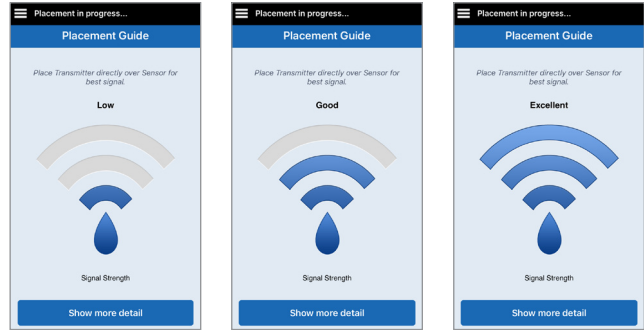

دليل الوضع - شاشة

Show More Detail


يؤدي الضغط على شاشة

Show More Detail إلى عرض

مؤشر قوة الإشارة بدقة أعلى.

• قد يساعدك هذا في تثبيت جهاز الإرسال

بشكل صحيح فوق المستشعر.

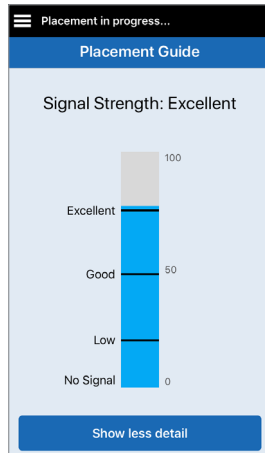

5. ارتداء جهاز الإرسال يوميًا

يصف هذا القسم الميزات العديدة لجهاز الإرسال الذكي وكيفية الحصول على مراقبة متواصلة دون انقطاع لمستويات الجلوكوز.

بمجرد انتهاء مرحلة الإحماء، تبدأ مرحلة التهيئة، وتكون مستعدًا لارتداء جهاز الإرسال الذكي. وخلال الأيام القليلة الأولى، سترتدي جهاز الإرسال الذكي فوق ضمادة Tegaderm™. ابدأ الإجراء دائمًا باستخدام جهاز إرسال ذكي مشحون حديثًا. يتصل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع كل من المستشعر والتطبيق ليقدم معلومات مراقبة الجلوكوز المستمرة.

يقوم جهاز إرسال Eversense E3 الذكي الخاص بك بما يلي:

• يشغل المستشعر.

• يحسب بيانات الجلوكوز ويخزنها.

• يقدم تنبيهات مذبذبة على الجسم عندما تصل إلى مستويات تنبيه الجلوكوز التي حددتها.

• يرسل بيانات الجلوكوز إلى التطبيق عبر تقنية Bluetooth.

• يمكن إعادة شحنه باستخدام حامل الشحن.

• يستخدم منفذ USB بحامل الشحن لتنزيل البيانات إلى التطبيقات الخارجية المتوافقة.

• مصباح LED متعدد الألوان يشير إلى الأوضاع المتعددة لجهاز الإرسال الذكي.

• يتصل بالجهاز المحمول.

• يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله.

الجزء العلوي

الجزء الخلفي



سون توصيل الخاصة بالشحن

الاستخدام اليومي

تلتقي قراءات الجلوكوز المستمرة والمعلومات، تذكر ما يلي عند استخدام جهاز الإرسال الذكي الخاص بك:

- ✓ قم بارتداء جهاز الإرسال الذكي الخاص بك دائماً باستثناء وقت الشحن.
- ✓ جهاز الإرسال الذكي مقاوم للماء حتى عمق متر واحد (3.2 أقدام) لمدة 30 دقيقة. سيؤدي تعريض جهاز الإرسال الذكي لظروف بخلاف هذه إلى التلف وإلغاء ضمانك.
- ✓ احرص على أن يحتوي جهاز الإرسال الذكي على ما يكفي من طاقة البطارية طيلة الوقت.
- ✓ قم بإجراء اختبار معايرة على جهاز قياس الجلوكوز بالدم عندما يُطلب منك ذلك.
- ✓ انتبه للتنبيهات والإشعارات التي تتلقاها من جهاز الإرسال الذكي الخاص بك وجهازك المحمول.
- ✓ استبدل الرقعة اللاصقة يوميًا.
- ✓ يمكنك إزالة جهاز الإرسال الذكي من أعلى الذراع في أي وقت إلا أثناء المعايرة. تذكر أنه لا يتم جمع أي بيانات إذا لم يكن جهاز الإرسال الذكي متصلاً بالمستشعر. عندما تعيد جهاز الإرسال الذكي إلى موضع المستشعر، قد تستغرق إعادة اتصال المستشعر وقراءات الجلوكوز ما يصل إلى 10 دقائق لتظهر في التطبيق.
- ✓ عندما لا يكون جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول ضمن نطاق بعضهما البعض، يتم تخزين أي بيانات جمعها جهاز الإرسال الذكي وإرسالها إلى التطبيق عندما يعود الجهاز المحمول وجهاز الإرسال الذكي إلى النطاق مرة أخرى.
- ✓ من الأمان بالنسبة لك أن ترتدي المستشعر وجهاز الإرسال الذكي أثناء مرورك عبر أجهزة كشف المعادن في المطارات. في أثناء الطيران، يعمل جهاز الإرسال الذكي مثل أي جهاز آخر بتقنية Bluetooth. احرص على اتباع إرشادات السلامة المحددة التي تقرضها شركة الطيران.
- ✓ حتى يتلقى جهاز الإرسال الذكي أول قيمة للجلوكوز بعد وضعه فوق المستشعر، سيعرض شريط الحالة في تطبيق الجهاز المحمول شاشة جمع البيانات "Collecting Data". قد ترى شريط الحالة هذا بعد شحن جهاز الإرسال الذكي مباشرةً.

تحذير: إذا كان جهاز الإرسال الذكي لديك تالفًا أو مكسورًا، فلا تستخدمه لأن هذا يمكن أن يشكل خطرًا على السلامة الكهربائية أو عطلًا ويمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية.

تثبيت جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر الذي تم إدخاله


يجب تثبيت جهاز الإرسال الذكي على الجلد فوق المستشعر مباشرة باستخدام الرقعة اللاصقة التي تُستخدم مرة واحدة. تم تصميم كل رقعة لاصقة بحيث يتم تبديلها يومياً كما أن لها جانب لاصق يلتصق بالجانب الخلفي في جهاز الإرسال الذكي وجانب لاصق من السيليكون يلتصق بالجلد. ينبغي أن يكون كل من سطح الجلد وجهاز الإرسال الذكي نظيفين وجافين لتثبيت اللاصقين بالرقعة. وخلال الأيام القليلة الأولى بعد الإدخال، سترتدي جهاز الإرسال الذكي فوق ضمادة Tegaderm. واترك ضمادة Tegaderm في مكانها، حسبما يرشدك مزود الرعاية الصحية. وتخلص من اللاصقات المستخدمة وفقاً للوائح المحلية الخاصة بك.

ملاحظة: ستحصل على الرقعات اللاصقة من مزود الرعاية الصحية الخاص بك. تأتي الرقعات اللاصقة مصنوعة من مواد بيضاء اللون وشفافة. والرقعات اللاصقة البيضاء تكون مثقوبة، مما يسمح بالتخلص من الرطوبة. بينما تُستخدم الرقعات اللاصقة الشفافة في المناسبات التي ترغب فيها بمزيد من حرية التصرف.

تنبيه: إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن رد الفعل التحسسي لمواد السيليكون، فتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك قبل الاستخدام. تخلص من الرقعة بعد 24 ساعة من الاستخدام.

2. ضع جهاز الإرسال الذكي فوق الجانب اللاصق (في الوسط) من الرقعة واضغط بحزم للتثبيت.

- ينبغي وضع جهاز الإرسال الذكي بحيث يتجه جانبه إلى جناحي الرقعة (كما يظهر).

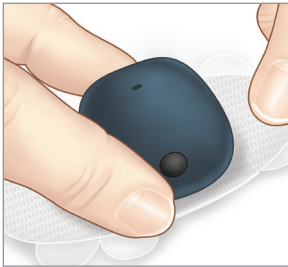


1. انزع الغلاف الورقي الذي يظهر عليه رسم جهاز إرسال Eversense E3 الذكي. حاول ألا تلمس الجزء اللاصق في الرقعة من الوسط.



3. انزع الغلاف الخلفي الشفاف الكبير وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر مباشرة.


- للحصول على شدة الإشارة المثلى، يجب وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر مباشرة. يمكن أيضًا تحسين قوة الإشارة عن طريق تدوير جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر، بحيث يكون المستشعر في وضع وسط رأسي أسفل جهاز الإرسال الذكي.

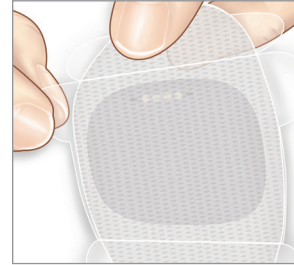

يمكنك ارتداء جهاز الإرسال الذكي فوق ضمادة Tegaderm باستخدام رقعة Eversense اللاصقة بعد اكتمال مرحلة الإحماء التي تستمر لمدة 24 ساعة.

4. تحقق من الاتصال بين جهاز الإرسال الذكي والمستشعر.


- اضغط على **Placement Guide** > **Menu**.
- راجع **Placement Guide** عند وصل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك لتضمن وجود اتصال ما بين المستشعر وجهاز الإرسال الذكي.

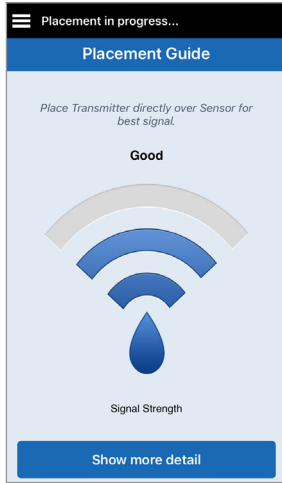


ملاحظة: للاطلاع على مزيد من المعلومات حول قوة

الإشارة وموضع جهاز الإرسال، انظر *Placement Guide* – شاشة *Show More Detail* في قسم ربط المستشعر.

5. اضغط الرقعة اللاصقة بحزم على سطح الجلد فوق المستشعر. لا تضغط بقوة خلال الأيام الأولى بعد الإدخال.
- ينبغي وضع جهاز الإرسال الذكي بحيث يستقر جناحا الرقعة على الذراع أفقيًا.

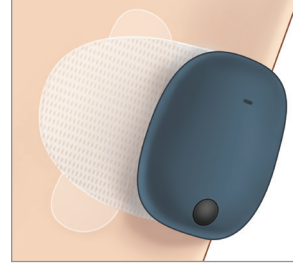

6. استخدم اللسان لسحب البطانة الشفافة المتبقية.
- تأكد من أن اللاصق أملتسًا على الجلد. تأكد من أن الرقعة مستوية على سطح الجلد.

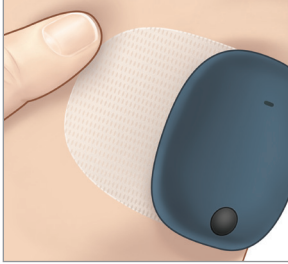


تشغيل جهاز الإرسال الذكي وإيقاف تشغيله

يتضمن جهاز الإرسال الذكي زر الطاقة لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. يُستخدم زر الطاقة (التشغيل) ومصباحين بصمام ثنائي باعث للضوء (LED) للإشارة إلى الطاقة المتبقية في البطارية.

1. لتشغيل جهاز الإرسال الذكي، اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا.

- سيصدر جهاز الإرسال الذكي نغمة مرة واحدة.
- حرر زر الطاقة وسيومض مصباح LED مرة واحدة بحيث يشير إلى تشغيل الجهاز.

يمكنك الضغط على زر الطاقة مرة واحدة في أي وقت لترى ما إذا كان جهاز الإرسال الذكي يعمل. إذا ظهر مصباح LED، فهذا يعني أن جهاز الإرسال الذكي يعمل. إذا لم يظهر مصباح LED، فهذا يعني أن جهاز الإرسال الذكي لا يعمل.

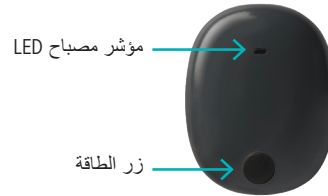

2. لإيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي، اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة خمس ثوانٍ تقريبًا.

- سيصدر جهاز الإرسال الذكي نغمة مرة واحدة.
- حرر زر الطاقة وسيومض الزر باللون البرتقالي مرة واحدة، بحيث يشير إلى إيقاف التشغيل.

العناية بجهاز الإرسال الذكي وصيانتته

- حافظ على نظافة جهاز الإرسال الذكي وحامل الشحن (خاليان من الغبار الظاهر) وحمايتهما عندما لا يكونان قيد الاستخدام. امسح الجزء الخارجي بقطعة قماش بين الاستخدامات للحفاظ على النظافة.
- اتصل بدم العملاء لاستبدال جهاز الإرسال، في حال تلقيت تنبيه "Battery Error Alert".
- اشحن جهاز الإرسال الذكي متى كانت طاقة البطارية منخفضة.
- لا تستخدم إلا مصدر الطاقة المتوفر مع نظامك لشحن بطارية جهاز الإرسال الذكي. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة غير الذي تزوده شركة Senseonics إلى إلغاء ضمان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك. لا تستخدم مصدر الطاقة إذا كان تالفًا بأي شكل.
- لتنظيف جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، امسحه بقطعة قماش مبللة بالماء؛ وتخلص من قطعة القماش وفقًا للوائح المحلية لديك.
- تخلص من جهاز الإرسال الذكي وكل مكونات النظام الأخرى وفقًا للوائح المحلية.

مؤشر البطارية

يمكن فحص طاقة بطارية جهاز الإرسال الذكي باستخدام التطبيق أو على جهاز الإرسال الذكي نفسه.

باستخدام التطبيق:

- اضغط على **Menu > About > My Transmitter**. قم بالتمرير لأسفل إلى خط مستوى البطارية الذي يبين مقدار شحن البطارية المتبقي.
- أو
- افحص أيقونة البطارية في الركن العلوي الأيمن على شاشة **MY GLUCOSE**. تشير أيقونة البطارية الحمراء إلى أن بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة.

باستخدام جهاز الإرسال الذكي:

- أثناء تشغيل جهاز الإرسال الذكي، اضغط على زر الطاقة وحرره. سيومض مصباح LED باللون الأخضر مرة واحدة إذا كانت البطارية تحتوي على طاقة لا تقل عن 10%. يوصى بأن تشحن جهاز الإرسال الذكي دائمًا لمدة 15 دقيقة كاملة باستخدام منفذ كهرباء في الحائط لتضمن شحنًا كاملاً. انظر الصفحة التالية للاطلاع على مزيد من المعلومات حول مؤشرات مصباح LED.

مؤشرات LED للحالة

يبلغ جهاز الإرسال الذكي عن عدة حالات مختلفة بناء على لون مصباح LED.

• أثناء استخدام جهاز الإرسال الذكي:

الإجراء	الحالة	حالة مصباح LED
إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهاز محمول	الوضع القابل للاكتشاف	أخضر وبرتقالي بالتبادل عند الضغط على زر الطاقة 3 مرات خلال 5 ثوانٍ
اضغط على زر الطاقة باستمرار لمدة 5 ثوانٍ لتشغيله	جهاز الإرسال الذكي لا يعمل	لا يومض عند الضغط على زر الطاقة
لا حاجة إلى إجراء فوري	طاقة البطارية 10% - 90%	يومض باللون الأخضر (مرة واحدة) عند الضغط على زر الطاقة
اشحن البطارية قريباً	شحن البطارية منخفض، تبقى أقل من 10% من شحن البطارية	يومض باللون البرتقالي (مرة واحدة) عند الضغط على زر الطاقة
راجع التطبيق على جهازك المحمول لفهم التنبيه	تم إطلاق تنبيه	مصباح LED بلون برتقالي لمدة دقيقة واحدة

• أثناء شحن جهاز الإرسال الذكي:

الإجراء	حالة البطارية	حالة مصباح LED
اشحن لمدة 15 دقيقة قبل الفصل من مصدر الطاقة	مشحون بنسبة 0% - 65%	يضئ بلون برتقالي ثابت أو يومض باللون البرتقالي عند التوصيل بكابل USB
اشحن لمدة 15 دقيقة قبل الفصل من مصدر الطاقة	مشحون بنسبة 65% - 100%	لون أخضر ثابت عند التوصيل بكابل USB

6. معايرة النظام

يصف هذا القسم إجراء المعايرة وجدول المعايرة الزمني لنظام Eversense E3 CGM الخاص بك.

تحذير: لا تستخدم مواقع اختبار بديلة مثل ساعدك عند إدخال قيم جلوكوز الدم للمعايرة.

6

لضمان الحصول على أفضل أداء، يجب إجراء معايرة روتينية باستخدام قراءات وخز الإصبع من جهاز قياس الجلوكوز بالدم. يمكن استخدام أي جهاز قياس متاح تجاريًا لإجراء المعايرة. بمجرد إدخال مستشعرك وربطه بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك، يبدأ النظام في مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة. المعايرة ليست مطلوبة أثناء هذه المرحلة.



هناك ثلاث مراحل للمعايرة:

مرحلة التهيئة - بعد مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة، يجب إكمال 4 اختبارات معايرة بوخز الإصبع، على أن تكون على فترات تتراوح ما بين ساعتين إلى 12 ساعة.

مرحلتنا معايرة يومية - بعد مرحلة التهيئة، يجب أن تكمل اختبار معايرة بوخز الإصبع كل 12 ساعة لمدة 21 يومًا على الأقل.

مرحلة معايرة يومية واحدة - سيكتشف النظام ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء معايرة واحدة أو اثنتين، وسينبهك إلى ذلك. في مرحلة المعايرة اليومية الواحدة، يجب عليك إكمال اختبار معايرة بوخز الإصبع كل 24 ساعة.

بعد انقضاء فترة الـ 21 يومًا الأولى، سينبهك النظام إلى ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء معايرة يومية واحدة أو اثنتين.

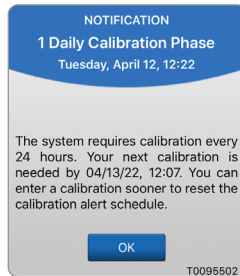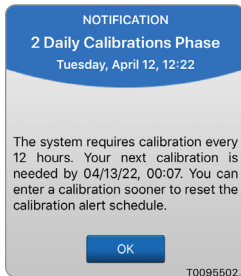

تحذير: في مرحلتي المعايرة اليومية، يتطلب نظام Eversense E3 CGM إجراء معايرة كل 12 ساعة لتقديم قراءات دقيقة. في مرحلة المعايرة اليومية الواحدة، يتطلب نظام Eversense E3 CGM إجراء معايرة كل 24 ساعة. ولا تستخدم قراءات CGM لاتخاذ قرارات علاج ما لم تتبع تعليمات المعايرة اليومية.

المعايرة الروتينية مهمة جدًا لضمان الحصول على أفضل أداء من نظام Eversense E3 CGM. يمكن أن تساعدك النصائح التالية على تحسين مقاييس معايرتك:

نصائح لضمان معايرة جيدة:

- ✓ قم بالمعايرة في أوقات لا يتغير فيها الجلوكوز بسرعة (مثل قبل الوجبات، قبل أخذ جرعة الأنسولين).
- ✓ قم بالمعايرة عندما تكون متأكدًا أنك لن تخلع جهاز الإرسال الذكي أثناء الخمس عشرة دقيقة القادمة.
- ✓ اغسل يديك بماء دافئ بالصابون وجففهما جيدًا قبل أن تأخذ قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم. من المهم جدًا أن تكون يداك نظيفتين وجافتين عندما تفحص الجلوكوز في دمك.
- ✓ اتبع دائمًا تعليمات الشركة منتجة جهاز قياس الجلوكوز بالدم لتحصل على قراءات دقيقة للجلوكوز بالدم لإجراء المعايرة.
- ✓ تأكد من أن الرمز الموجود على قارورة شريط الاختبار يطابق الرمز الموجود على جهاز قياس الجلوكوز بالدم لديك (إذا كان الترميز مطلوبًا).

المعايرة لن تكتمل أو النتائج لن تكون مقبولة إذا:

- ✗ كانت قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم أقل من 40 mg/dL.
- ✗ كانت قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم أكبر من 400 mg/dL.
- ✗ تم أخذ قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم أكثر من 10 دقائق قبل إدخال النتيجة في تطبيق Eversense App.
- ✗ كانت قراءة مستشعر الجلوكوز مختلفة جدًا عن قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم.
- ✗ تمت إزالة جهاز الإرسال الذكي أو تعذر جمع بيانات مستشعر الجلوكوز خلال 15 دقيقة بعد إدخال قيمة المعايرة.

مراحل المعايرة

أ. مرحلة التهيئة (بعد مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة)

أثناء هذه المرحلة، يجب إجراء 4 اختبارات بمقياس جلوكوز الدم بوخز الاصبع.

- يجب أن يتراوح الفارق الزمني بين اختبارات المعايرة الأربعة بين ساعتين و12 ساعة ويجب إكمال الاختبارات الأربعة كلها خلال فترة 36 ساعة. بعد مرور 8 ساعات بدون إدخال قيمة معايرة، لن يتم عرض بيانات الجلوكوز.
 - المعايرة الأولى = بعد 24 ساعة من ربط المستشعر.
 - المعايرة الثانية = ساعتين حتى 12 ساعة بعد نجاح المعايرة الأولى.
 - المعايرة الثالثة = ساعتين حتى 12 ساعة بعد نجاح المعايرة الثانية.
 - المعايرة الرابعة = ساعتين حتى 12 ساعة بعد نجاح المعايرة الثالثة.
- ستبدأ قراءات الجلوكوز في الظهور في التطبيق بعد دقائق قليلة من اكتمال المعايرة الثانية بنجاح.

مهم: إذا لم يتم تشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك وإفرانه بتطبيق Eversense App والمستشعر، فلن يتمكن النظام من مطالبتك بإجراء المعايرة.

إعادة الدخول في مرحلة التهيئة

سيؤدي ما يلي إلى أن يعيد النظام الدخول في مرحلة التهيئة.

- عدم إكمال اختبار معايرة خلال مدة 12 ساعة أثناء مرحلة التهيئة.
- عدم إكمال كل اختبارات المعايرة الأربعة خلال 36 ساعة أثناء مرحلة التهيئة.
- عدم إتمام إدخال المعايرة المطلوبة خلال مرحلة المعايرة اليومية.
 - معايرة واحدة كل 12 ساعة خلال أول 21 يوماً من الارتداء، وفي أي وقت يكون النظام في مرحلتي المعايرة اليومية
 - معايرة واحدة كل 24 ساعة عندما يكون النظام في "مرحلة المعايرة اليومية الواحدة"
- إذا اختلفت آخر عدة قياسات باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم بشدة عن قيم مستشعر الجلوكوز.
- إذا كان شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي قد نفذ منذ أكثر من 16 ساعة.
- عندما تتلقى تنبيه فحص المستشعر.
- بعد ست ساعات من تلقفك لتبنيه Sensor Suspend.

ب. مراحل المعايرة اليومية

هناك مرحلتان للمعايرة اليومية:

تتطلب "مرحلة المعايرة اليومية" إجراء اختبار مقياس جلوكوز الدم كل 12 ساعة. وتبدأ مرحلة المعايرة اليومية بعد اكتمال مرحلة التهيئة بنجاح.

- بعد مرور 12 ساعة على آخر معايرة ناجحة، سيطلب منك النظام إجراء المعايرة.
- يمكنك اختياريًا إدخال عمليات معايرة بشكل أكثر تكرارًا. ويجب أن يتراوح الفاصل الزمني بين إدخالات قيمة المعايرة اليومية ساعة واحدة على الأقل.
- إذا لم تتم بالمعايرة في خلال 16 ساعة، فستتلقى تنبيه "تجاوز موعد المعايرة"، ولن يتم عرض أي قيم للجلوكوز حتى يتم إدخال قيمة المعايرة. وبعد مرور 24 ساعة دون إدخال قيمة معايرة، ستتلقى تنبيه "انتهاء صلاحية المعايرة" وسيعود النظام إلى مرحلة التهيئة.

تتطلب "مرحلة المعايرة اليومية الواحدة" إجراء اختبار جلوكوز الدم بوخز الإصبع كل 24 ساعة.

- بعد مرور 24 ساعة على آخر معايرة ناجحة، سيطلب منك النظام إجراء المعايرة.
- يمكنك اختياريًا إدخال عمليات معايرة بشكل أكثر تكرارًا. ويجب أن يتراوح الفاصل الزمني بين إدخالات قيمة المعايرة اليومية ساعة واحدة على الأقل.
- إذا لم تتم بالمعايرة في خلال 28 ساعة، فستتلقى تنبيه "تجاوز موعد المعايرة" (Calibration Past Due)، ولن يتم عرض أي قيم للجلوكوز حتى يتم إدخال قيمة المعايرة. وبعد مرور 40 ساعة دون إدخال قيمة معايرة، ستتلقى تنبيه "انتهاء صلاحية المعايرة" (Calibration Expired) وسيعود النظام إلى مرحلة التهيئة.

ALERT
Calibration Expired
Tuesday, April 12, 12:34

No Glucose Values Displayed

A calibration has not been performed in 24 hours. Your system is now in re-initialisation phase and 4 calibrations are required within 36 hours.

Not Now
Calibrate

T0095502

ALERT
Calibration Past Due
Tuesday, April 12, 12:34

No Glucose Values Displayed

Your calibration was due at 04/12/22, 08:34. No glucose values can be displayed until you calibrate.

Not Now
Calibrate

T0095502

تحذير: تمنع بعض الظروف والتنبيهات عرض بيانات الجلوكوز. وخلال هذه الأوقات، يجب عليك استخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم بالمنزل لاتخاذ قرارات العلاج. يجب عليك قراءة قسم التنبيهات والإشعارات بعناية من دليل المستخدم هذا، لفهم هذه الظروف.

ملاحظة: إن كانت قيمة المعايرة المدخلة مختلفة بشكل كبير عن قيمة مستشعر الجلوكوز، فسيتطلب منك اتخاذ إجراء فيما يخص إشعار إجراء المعايرة الآن Calibrate Now بعد حوالي ساعة. وسيتم عرض تنبيه إجراء معايرة الآن Calibrate Now لمدة 11 إلى 12 ساعة بعد ذلك، بغض النظر عن مرحلة المعايرة اليومية التي يتواجد بها النظام. في هذه الحالة، إذا لم تقم بالمعايرة خلال 16 ساعة، فلن يتم عرض أي قيم جلوكوز. وإذا مرت 24 ساعة بدون معايرة، فسيعود النظام إلى مرحلة التهيئة.

تحذير: قم دائماً بمعايرة النظام باستخدام عينة دم بوخز الإصبع فقط. لا تستخدم قراءة جلوكوز الدم من موضع بديل (مثل المساعد أو راحة اليد) لمعايرة النظام.

ملاحظة: يمكنك إدخال قراءات معايرة إضافية طالما أن الفارق الزمني بين كل معايرة لا يقل عن ساعة.

1. يمكنك إدخال قيمة المعايرة من خلال الضغط على **Calibrate** من القائمة الرئيسية أو عبر إشعار أو تنبيه **Calibrate Now**.

Glucose Within Target Levels	
Calibrate	Submit
Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.	
Time	14:05 >
Glucose	>
Notes	>
Current Phase	2 Daily Calibrations
Next Scheduled Calibration Time	
Tomorrow 00:27	
Days Since Insertion: 4	
> Calibration Tips	

NOTIFICATION	
Calibrate Now	
Tuesday, April 12, 11:47 am	
Your calibration is due. Please perform a fingerstick blood glucose meter calibration now.	
Not Now	Calibrate
T0095502	


ALERT	
Calibrate Now	
Tuesday, April 12, 12:33	
In 4 hours, your calibration will be past due and no glucose will be displayed. Please enter a fingerstick blood glucose calibration now.	
Not Now	Calibrate
T0095502	

Glucose Within Target Levels	
	Enter the from you
Joe Smith	Time
My Glucose	Glucose
Calibrate	Notes
Alert History	Current
Event Log	Next S
Reports	Today
Share My Data	Days S
Placement Guide	> Calib
Connect	
Settings	

3. اضغط على **Glucose** وقم بإدخال القيمة المأخوذة من اختبار الجلوكوز بالدم بوخز الإصبع.

- اضغط على **Done**.
- اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.
- اضغط على **Done**.

2. احصل على قراءة باستخدام وخز الإصبع من جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك.

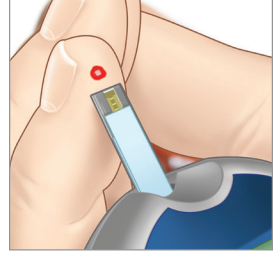

6

Glucose Within Target Levels	
Calibrate	Submit
Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.	
Time	14:06 >
Glucose	105 mg/dL >
Notes	>
Cancel	Glucose Done
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108


Glucose Within Target Levels	
Calibrate	Submit
Enter the blood glucose value and time collected from your meter, then tap 'Submit' to enter.	
Time	14:05 >
Glucose	>
Notes	>
Current Phase	2 Daily Calibrations
Next Scheduled Calibration Time	
Tomorrow 00:27	
Days Since Insertion: 4	
> Calibration Tips	

ملاحظة: لا يمكنك إدخال قيمة معايرة عمرها أطول من 10 دقائق.


6. تظهر شاشة MY GLUCOSE مع أيقونة نقطة دم رمادية اللون، لتوضح أن المعايرة بوخز الإصبع جارية. ستتحول قطرة الدم إلى اللون الأحمر عند قبول قيمة المعايرة.



5. تظهر شاشة CALIBRATION .IN PROGRESS . اضغط على OK.

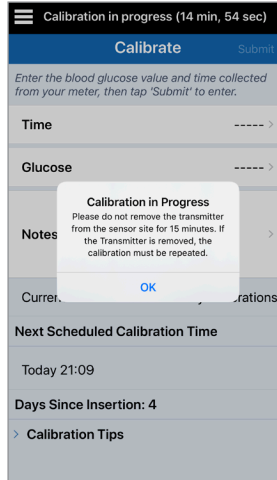

4. تعرض شاشة CALIBRATE الآن الوقت وقراءة الجلوكوز التي أدخلتها. فإذا لم تكن صحيحة، ففكر الخطوة 3. • عندما تكون صحيحة، اضغط على Submit.

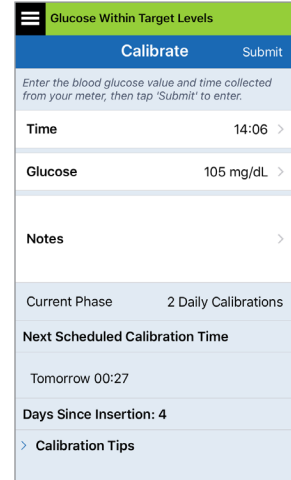

مهم: ينبغي عدم فك جهاز الإرسال الذكي من فوق المستشعر لمدة لا تقل عن 5 دقائق قبل الاختبار وحتى 15 دقيقة بعد الاختبار أثناء سير المعايرة. يتيح لك شريط الحالة أعلى الشاشة أن تعرف متى تكتمل المعايرة. في حالة إزالة جهاز الإرسال الذكي قبل اكتمال المعايرة، سيطلب منك إجراء المعايرة مجددًا.

ملاحظة: قد تكون هناك حالات حيث لا تكون نتيجة المعايرة مقبولة.

لن يتم قبول المعايرة إذا:

- ✗ كانت قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم أقل من 40 mg/dL.
- ✗ كانت قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم أكبر من 400 mg/dL.

Calibration Cannot be Used
Blood glucose values more than 400 mg/dL cannot be used for calibration. Please take appropriate action and calibrate again when glucose is between 40 and 400 mg/dL. This entry will be logged as a BG entry.

OK

- ✗ تمت إزالة جهاز الإرسال الذكي أو تعذر جمع بيانات مستشعر الجلوكوز خلال 15 دقيقة بعد إدخال قيمة المعايرة.

تشير ألوان أيقونة المعايرة إلى حالة قيمة المعايرة المدخلة. انظر الجدول أدناه.

الحالة	الوصف
	المعايرة قيد التقدم تظهر خلال 15 دقيقة تقريبًا بعد إدخال قيمة المعايرة. لا تقم بإزالة جهاز الإرسال خلال هذا الوقت. ستنحول الأيقونة إما إلى اللون الأحمر أو الأسود أو الأزرق، عندما لا تكون المعايرة قيد التقدم.
	المعايرة مقبولة تظهر بعد فترة المعايرة التي تبلغ 15 دقيقة تقريبًا، إن تم قبول قيمة المعايرة المدخلة.
	لم تكتمل المعايرة تظهر في حالة إزالة جهاز الإرسال من أعلى المستشعر خلال فترة المعايرة التي تبلغ 15 دقيقة تقريبًا. وسيلزم إدخال قيمة معايرة جديدة.
	لا يمكن استخدام المعايرة تظهر إن كانت قيمة المعايرة المدخلة أقل من 40 mg/dL، أو أكثر من 400 mg/dL. ويتم حفظ القيمة المدخلة، كإدخال يدوي للجلوكوز بالدم. قم بالمعايرة مجددًا، إن كانت قيمة الجلوكوز بالدم ما بين 40 و400 mg/dL.
	إدخال حدث جلوكوز بالدم تُعرض عند إدخال قيمة الجلوكوز بالدم يدويًا عبر سجل الأحداث Event Log.

7. استخدام التطبيق

7

يصف هذا القسم تطبيق Eversense App، بما في ذلك الشاشة الرئيسية والرسم البياني للاتجاه وأسهم الاتجاهات وشاشة القائمة.

يتصل التطبيق بجهاز الإرسال الذكي ليتلقى بيانات الجلوكوز والاتجاهات والرسوم البيانية والتنبيهات ثم يعرضها. كما يخزن التطبيق ذاكرة فحوصات الجلوكوز حتى 90 يومًا من تخزين البيانات.

ملاحظة: عندما تسجل الخروج من تطبيق Eversense App، لن يرسل جهاز الإرسال الذكي الخاص بك بيانات الجلوكوز إلى التطبيق قبل إعادة تسجيل الدخول.

من شاشة **MY GLUCOSE** تستطيع الوصول بسهولة إلى:

- قياسات مستشعر الجلوكوز في الوقت الفعلي.
- معدل مستويات الجلوكوز المتغيرة لديك واتجاهها.
- الاتجاهات البيانية لمستويات الجلوكوز لديك.
- التنبيهات (انخفاض سكر الدم وارتفاع سكر الدم).
- الأحداث مثل الوجبات والتمارين والأدوية.

ملاحظة: يلزم توافر اتصال إنترنت لاسلكي لتنزيل تطبيق Eversense App أو تحديثه.

إدارة حساب Eversense

لأغراض الأمان، إن أدخلت كلمة المرور بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية في تطبيق الجهاز المحمول، فسيتم قفل حسابك لمدة 30 دقيقة. وخلال هذا الوقت، لن يمكنك الوصول إلى بيانات CGM على الجهاز المحمول.

Account Locked for 30 Minutes

You have entered an incorrect password 3 times. For security, your account is temporarily locked. Please try again at 14:27.

OK

Incorrect Password

You have entered an incorrect password 1 times. You have 2 more attempts remaining before your account is temporarily locked out.

OK

تنبيه: إن تعذر عليك الوصول إلى بيانات CGM، فيجب عليك مراقبة الجلوكوز الخاص بك، باستخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم بالمنزل.

وسيتحقق تطبيق Eversense Mobile App بشكل دوري للتأكد من عدم تغيير معلومات تسجيل الدخول عبر حساب Eversense DMS الخاص بك.

New Password Detected

A new password was detected for your DMS account. To continue, log out of the app and log back in. If you did not make this change, contact customer support.

OK

ALERT

New Password Detected

Wednesday, April 13, 14:34

A new password was detected for your DMS account. To continue, log out of the app and log back in. If you did not make this change, contact customer support.

OK

DEMO4527

إذا قمت بتغيير كلمة مرور حساب Eversense من شاشة DMS log in أو صفحة DMS Change Password، فيجب عليك تسجيل الخروج من تطبيق Eversense Mobile App وإعادة تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة. وإذا لم تتطابق كلمات المرور، فسيقوم تطبيق Eversense Mobile App بإعلامك بذلك وتنبهك إلى أن بعض الميزات غير متوفرة، بما في ذلك تعذر مزامنة بياناتك مع حساب DMS الخاص بك، وعدم القدرة على إضافة مستخدم Eversense NOW إلى دائرتك، وتعذر إجراء تغييرات على صورة ملفك الشخصي.

وإذا أدخلت كلمة مرور غير صحيحة ثلاث مرات في صفحة DMS log in، فقد لا تتوفر بعض ميزات تطبيق الجهاز المحمول لمدة 30 دقيقة، بما في ذلك عدم مزامنة البيانات مع حساب DMS الخاص بك، ولا يمكن إضافة مستخدم Eversense NOW إلى دائرتك، وسيتعذر إجراء أي تغييرات على صورة ملفك الشخصي. لا يجب عليك تسجيل الخروج من تطبيق الجهاز المحمول في هذا الوقت.

Account Locked for 30 Minutes

An incorrect password was entered 3 times. This feature is temporarily unavailable. Please try again in 30 minutes. Do NOT log out of the mobile app for 30 minutes.

OK

فحص إعدادات جهازك المحمول


ستحتاج إلى جهاز محمول (مثل هاتفك الذكي) لتستخدم نظام Eversense E3 CGM. من المهم جدًا إعداد جهازك المحمول بشكل صحيح لضمان العرض الدقيق لبيانات الجلوكوز الخاصة بك في التطبيق. اتبع تعليمات الشركة منتجة جهازك المحمول لإعداد ما يلي:

- الوقت والتاريخ.
- تشغيل Bluetooth (تمكينه).
- تشغيل الإشعارات.
- شحن البطارية.
- المنطقة الجغرافية.
- اللغة.
- ينبغي ألا يكون الصوت في الجهاز المحمول على وضع الذبذبة.
- ينبغي أن يكون وضع عدم الإزعاج Do Not Disturb مغلقًا، حيث قد تؤدي بعض التطبيقات والإعدادات مثل وضع القيادة Driving Mode إلى تشغيل وضع عدم الإزعاج Do Not Disturb تلقائيًا. يرجى الرجوع إلى تعليمات جهازك المحمول للاطلاع على المزيد من المعلومات.
- إذا كان جهازك المحمول مضبوطًا على وضع Do Not Disturb، فلن تسمع أي إشعارات من تطبيق Eversense App.*

* بالنسبة لنظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث، وAndroid 6 والإصدارات الأحدث، يمكنك السماح لتنبهات "الجلوكوز المنخفض" و"انخفاض الجلوكوز خارج النطاق" لـ Eversense، بتجاوز إعدادات الصوت بهاتفك. انظر إعدادات الصوت للاطلاع على المزيد من المعلومات.

تعرّف على شاشة "My Glucose"

شاشة **MY GLUCOSE** هي شاشة العرض الرئيسية للتطبيق. وتعرض عدة بيانات تشمل قراءات مستشعر الجلوكوز، وسهم الاتجاه ومعدل التغير، والرسم البياني للاتجاه، والأحداث، وعمليات المعايرة، والتنبيهات والإشعارات.

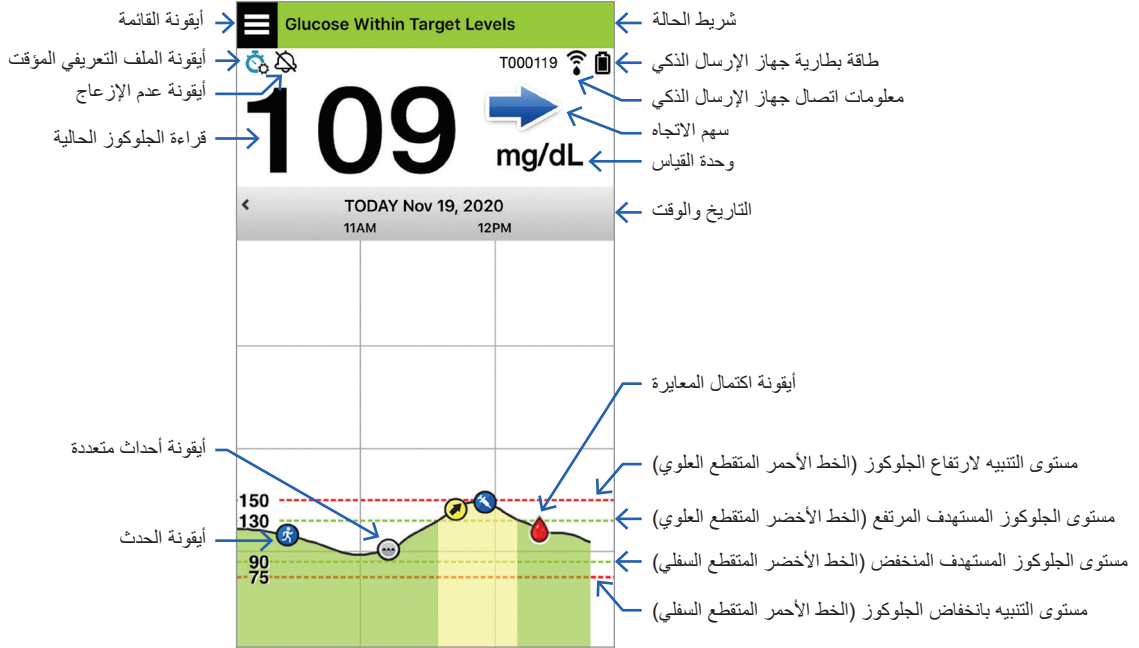

قبل اتخاذ قرار علاج، يجب أن تأخذ في الاعتبار قيمة مستشعر الجلوكوز، والرسم البياني للاتجاه، وسهم الاتجاه، وأي تنبيهات من نظام Eversense E3 CGM. وإذا لم يتم عرض سهم الاتجاه، فذلك يعني أن النظام لا يحتوي على بيانات كافية لعرض الاتجاه ومعدل التغيير. ويجب ألا تتخذ قرار علاج بناءً على قيمة مستشعر الجلوكوز فقط.

ملاحظة:






- يمكنك استعراض لقطة سريعة لمعلومات Eversense على أجهزتك التي تعمل بنظام التشغيل iOS أو Android. للاطلاع على معلومات حول إدارة التطبيقات المصغرة، راجع دليل المستخدم لجهازك المحمول. عنصر واجهة المستخدم لتطبيق Eversense غير متوفر على جميع أنظمة التشغيل.
- يمكنك الاطلاع على شاشة **MY GLUCOSE** باتجاه عرضي لتصل إلى أزرار الاختصارات للاطلاع على آخر 7 أيام أو 14 يوماً أو 30 يوماً أو 90 يوماً، ويمكنك إرسال هذا العرض عبر البريد الإلكتروني بضغطة واحدة.

شريط الحالة	يقدم معلومات مهمة عن الوضع الحالي للجلوكوز والنظام لديك.
معرفة جهاز الإرسال الذكي	هذا هو جهاز الإرسال الذكي الذي تستخدمه الآن. يمكنك تغيير الاسم بالضغط على Settings > System .
قراءة الجلوكوز الحالية	مستوى الجلوكوز الحالي في الوقت الفعلي. يتم تحديث هذا كل 5 دقائق.
التاريخ والوقت	التاريخ والوقت الحاليين. يمكنك التمرير إلى اليسار أو اليمين لترى التواريخ والأوقات المختلفة.
طاقة بطارية جهاز الإرسال الذكي	يبين شحن البطارية المتبقي في جهاز الإرسال الذكي.
اتصال جهاز الإرسال الذكي	يوضح قوة اتصال جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع المستشعر أو مع الجهاز المحمول.
سهم الاتجاه	يبين اتجاه حركة مستويات الجلوكوز لديك.
وحدة القياس	هذه هي وحدة القياس المستخدمة لعرض كل بيانات الجلوكوز.
مستوى التنبيه بانخفاض/ارتفاع الجلوكوز	المستويات المحددة لتنبيهات ارتفاع وانخفاض الجلوكوز.
مستوى الجلوكوز المستهدف المرتفع/المنخفض	المستويات المحددة للجلوكوز المرتفع والمنخفض المستهدف (النطاق المستهدف).

يبين وقوع عدة أحداث في الوقت نفسه.	أيقونة أحداث متعددة
تبين الأحداث التي تم إدخالها يدوياً (مثل التمرين). انظر تسجيل الأحداث (Logging Events) للاطلاع على المزيد من المعلومات.	أيقونة الحدث
تشير إلى حالة القيم المدخلة للمعايرة.	أيقونات المعايرة
مستويات الجلوكوز بمرور الزمن. ويمكنك التمرير للخلف والأمام لترى الاتجاهات أو التكبير لعرض بيانات مدة قصيرة تبلغ 3 ساعات أو التصغير لترى مدة تصل إلى 3 أيام.	الرسم البياني لاتجاه الجلوكوز
توفر إمكانية التنقل بسهولة بين الأقسام المتعددة في تطبيق Eversense App: <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="267 361 345 417">Settings About</div> <div data-bbox="445 361 606 484">Reports Share My Data Placement Guide Connect</div> <div data-bbox="729 361 847 484">My Glucose Calibrate Alert History Event Log</div> </div>	القائمة

أسهم الاتجاهات

هناك 5 أسهم اتجاهات مختلفة تبين الاتجاه الحالي لمستويات الجلوكوز لديك ومدى سرعة تغييرها.

مستويات الجلوكوز التي ترتفع أو تنخفض تدريجيًا، والتي تنخفض أو ترتفع بمعدل يتراوح بين 0.0 mg/dL و 1.0 mg/dL في الدقيقة.	
مستوى الجلوكوز الذي يرتفع بمعدل معتدل يتراوح بين 1.0 mg/dL و 2.0 mg/dL في الدقيقة.	
مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل معتدل يتراوح بين 1.0 mg/dL و 2.0 mg/dL في الدقيقة.	
مستويات الجلوكوز التي ترتفع بمعدل سريع جدًا يزيد على 2.0 mg/dL في الدقيقة.	
مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل سريع جدًا يزيد على 2.0 mg/dL في الدقيقة.	

7

يستخدم التطبيق آخر 20 دقيقة من بيانات الجلوكوز المستمرة لحساب اتجاهات الجلوكوز.

في حالة عدم توفر قيم مستشعر كافية لحساب سهم الاتجاه، لا يتم عرضه وتكون قيمة الجلوكوز باللون الرمادي بدلاً من الأسود. قبل اتخاذ قرار علاج، يجب أن تأخذ في الاعتبار قيمة مستشعر الجلوكوز، والرسم البياني للاتجاه، وسهم الاتجاه، وأي تنبيهات من نظام Eversense E3 CGM. وإذا لم يتم عرض سهم الاتجاه، فذلك يعني أن النظام لا يحتوي على بيانات كافية لعرض الاتجاه ومعدل التغيير. ويجب ألا تتخذ قرار علاج بناءً على قيمة مستشعر الجلوكوز فقط.

فهم قرارات العلاج مع نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة

اقرأ دليل مستخدم نظام Eversense E3 CGM بالكامل وتأكد من أنك على دراية بمتى يجب عليك اتخاذ قرارات علاج ومتى لا يتوجب عليك ذلك، بناءً على معلومات نظام CGM. قبل البدء باستخدام Eversense E3 لاتخاذ قرارات العلاج، تحدث إلى مزود الرعاية الصحية لفهم كيفية تأثير الطعام والأنسولين والأدوية والتوتر والتمارين الرياضية على قيم الجلوكوز.

مهم:

- إذا لم تكن أعراضك متطابقة مع المعلومات المعروضة من مستشعر الجلوكوز، أو أن التطبيق لا يعرض الرقم وسهم الاتجاه، فعليك استخدام مقياس الجلوكوز بالدم لاتخاذ قرارات العلاج.
- استخدم مقياس الجلوكوز بالدم لاتخاذ قرارات العلاج، إلى أن تعرف طريقة عمل Eversense E3 بالنسبة لك. قد يستغرق الأمر أياماً أو أسابيع أو حتى شهوراً، حتى تصبح مطمئناً لاستخدام بيانات CGM لاتخاذ قرارات العلاج.

ولا تتسرع، واتبع توصيات مزود الرعاية الصحية فيما يخص وقت استخدام Eversense E3 بدلاً من مقياس الجلوكوز بالدم.

الجلوكوز من المستشعر والجلوكوز بالدم

يُقاس الجلوكوز من المستشعر عبر السائل الخلالي، وليس من الدم. ولذا، قد تختلف قيم الجلوكوز بالمستشعر عن قيم الجلوكوز بالدم. على سبيل المثال، عندما يُظهر سهم اتجاه CGM هبوطاً سريعاً في مستوى الجلوكوز، قد يكون الجلوكوز بالدم أقل من الرقم الموضح، أو عندما يُظهر سهم اتجاه CGM ارتفاعاً سريعاً، قد يكون مستوى الجلوكوز بالدم لديك أعلى من الرقم الموضح. وتزداد احتمالية حدوث هذه الأمثلة عندما يتغير الجلوكوز بسرعة، على سبيل المثال بعد تناول الطعام، أو بعد الحصول على جرعة أنسولين، أو أثناء التمرين وبعده. يمكن أن يؤثر القلق والمرض وحتى بعض الأدوية التي تتناولها على مستوى الجلوكوز. يتمثل قرار العلاج الصحيح، في بعض الأحيان، في الانتظار والتحقق من بيانات CGM بشكل متكرر قبل اتخاذ أي إجراء.

وقت الارتداء المبكر

خلال فترة الإحماء التي تستمر لمدة 24 ساعة، لا يتم عرض قيم الجلوكوز. وأيضًا، خلال وقت الارتداء المبكر وبينما يتعافى موضع الإدخال، قد لا تتطابق قيم الجلوكوز بالمستشعر مع قيم الجلوكوز بالدم، بينما تتطابق بشكل كبير عند إتمام الامتثال للشفاء. استخدم مقياس الجلوكوز بالدم لاتخاذ قرارات العلاج خلال مرحلة الإحماء، وحتى تثق في قيم نظام CGM الخاص بك. وتذكر دائمًا، إن لم تتطابق قيمة الجلوكوز وسهم الاتجاه مع حالتك التي تشعر بها، فاستخدم مقياس الجلوكوز بالدم.

الاتصال عبر تقنية Bluetooth

يتصل جهاز الإرسال الذكي لاسلكيًا مع الجهاز المحمول عبر تقنية Bluetooth لعرض قراءات الجلوكوز. فإذا تم قطع الاتصال ما بين جهاز الإرسال الذكي الخاص بك والجهاز المحمول، فلن ترى قيمة الجلوكوز أو سهم الاتجاه. استخدم مقياس الجلوكوز بالدم لاتخاذ قرارات العلاج، إن تعذر اتصال جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول.

تنبيه اهتزازي على الجسم

يوفر جهاز الإرسال الذكي تنبيهات اهتزازية عند تجاوزك مستويات التنبيه بالجلوكوز التي قمت بتعيينها. ومع ذلك، لا تستعين بهذه التنبيهات لاتخاذ قرارات العلاج. عندما تتلقى تنبيهًا اهتزازيًا على الجسم، تحقق من قراءة الجلوكوز وسهم الاتجاه على تطبيق Eversense App.

المراقبة عن بعد من خلال تطبيق Eversense NOW

لا يجوز اتخاذ قرارات العلاج بناءً على معلومات نظام CGM المعروضة على تطبيق المراقبة عن بعد للأجهزة المحمولة Eversense NOW Remote Monitoring Mobile App. حيث تعتمد عملية المراقبة عن بعد على البيانات المرسلة من جهازك المحمول عبر سحابة Eversense، ومن ثم إلى تطبيق Eversense NOW. وستؤدي أية انقطاعات في أي من هذه الاتصالات إلى تأخير عرض البيانات في تطبيق Eversense NOW. ويمكن فقط استخدام معلومات نظام CGM المرسلة مباشرةً من جهاز الإرسال الذكي إلى جهازك المحمول لاتخاذ قرارات العلاج.

الوجبات

يمكن أن تؤثر الأنواع المختلفة من الوجبات والأطعمة على مستويات الجلوكوز وأسهم الاتجاهات بطرق مختلفة، كما هو الحال مع حالات مثل خزل المعدة المؤجل. سترفع بعض الأطعمة مستويات الجلوكوز لديك بشكل أسرع من غيرها. قبل استخدام بيانات نظام CGM لاتخاذ قرارات العلاج، تناقش مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك حول كيفية إدارة جرعات الأنسولين فيما يخص أنواعاً مختلفة من الأطعمة، وكيفية حساب الكربوهيدرات بدقة.

الأنسولين

لا يؤثر الأنسولين على الجلوكوز على الفور. على سبيل المثال، اعتماداً على العلامة التجارية للأنسولين سريع المفعول المستخدم، يمكن أن يستغرق بدء التأثير ما بين 5 إلى 15 دقيقة، وتكون ذروة التأثير خلال ساعة إلى ساعتين ومدة المفعول من 4 إلى 6 ساعات. فتأكد من فهمك للوقت الذي يُتوقع أن يستغرقه الأنسولين للبدء في خفض مستوى الجلوكوز لديك، ومتى تكون ذروة تأثيره، ومدة استمرار مفعوله داخل جسمك لخفض مستويات الجلوكوز. إن التعاون مع مزود الرعاية الصحية، لفهم وقت بدء المفعول ووقت ذروة التأثير بالإضافة إلى فترة المفعول، يساعدك على تجنب تكديس الأنسولين. حيث يحدث تكديس الأنسولين عندما تحصل على جرعة أنسولين بينما لا يزال مفعول الجرعة السابقة مستمرًا في خفض مستويات الجلوكوز لديك. ويمكن أن يحدث انخفاض سكر في الدم، والذي يكون شديدًا في بعض الأحيان. وبدلاً من الاستجابة وتناول جرعة أنسولين بناءً على قيمة CGM العالية، تأكد مما إذا كانت آخر جرعة أنسولين حصلت عليها لا تزال تعمل في خفض مستويات الجلوكوز لديك.

التمارين

حتى التمارين الخفيفة نسبياً، إذا لم تكن جزءاً من روتينك المعتاد، قد تتسبب في تغيير قيم الجلوكوز بسرعة أكبر من المعتاد. وإذا لم تتطابق الأعراض مع قيمة CGM لديك، أو إن كانت قيمة CGM وسهم الاتجاه بخلاف ما توقعت، فاستخدم مقياس الجلوكوز بالدم لاتخاذ قرارات العلاج. يعاني بعض الأشخاص من تأخر ظهور انخفاض سكر الدم بعد ساعات من التمرين. ويجب عليك اتباع توصيات مزود الرعاية الصحية الخاص بك بشأن جرعات الأنسولين بعد التمرين لتجنب انخفاض الجلوكوز.

عندما تكون مريضاً أو قلقاً، تتأثر قيم الجلوكوز لديك، وقد يتوجب وضع ذلك بالاعتبار عند اتخاذ قرارات العلاج. وتذكر أن القلق ليس سلبياً دائماً. قد تجد أن مستويات الجلوكوز لديك تتغير عند الذهاب في عطلة أو حضور حدث اجتماعي. يمكن أن يساعدك مزود الرعاية الصحية في وضع خطة لقرارات العلاج عندما تكون مريضاً أو عند تعرضك للقلق.

الأدوية

اعرف كيف تؤثر الأدوية التي تتناولها على قيم الجلوكوز لديك. تعمل بعض أدوية السكري على خفض قيمة الجلوكوز لديك، وقد تزيد بعض الأدوية، مثل الستيرويدات، من مستويات الجلوكوز. وباستخدام Eversense E3، قد تؤدي الأدوية من نوع التتراسيكلين إلى خفض الجلوكوز بشكل خاطئ، ويجب ألا تعتمد على قراءات CGM عند تناول الأدوية ضمن هذا النوع. تحدث مع مزود الرعاية الصحية حول الأدوية التي تتناولها وما يتعين عليك مراعاته عند اتخاذ قرارات العلاج.

تنبيهات الجلوكوز في Eversense E3

سيساعدك مزود الرعاية الصحية في تحديد النطاق المستهدف ومستويات التنبيه بمستويات الجلوكوز، بما يناسب حالتك أكثر. فانتبه إلى تنبيهات الجلوكوز في Eversense E3 - قد تحتاج إلى اتخاذ قرار علاج. عندما تتلقى تنبيه "مستوى جلوكوز خارج النطاق"، تكون قيمة الجلوكوز بالمستشعر أقل من 40 mg/dL، ويظهر LO بدلاً من الرقم، أو تكون القيمة أكبر من 400 mg/dL، ويظهر HI بدلاً من الرقم. اسأل مزود الرعاية الصحية كيف أن علاج مستويات الجلوكوز المنخفضة جداً أو المرتفعة جداً قد يختلف عن أي طريقة أخرى تتبعها، واستخدم دائماً مقياس الجلوكوز في الدم لاتخاذ قرار العلاج عند ظهور LO أو HI.

فكر بشكل استباقي




انتبه بعناية للوقت من اليوم الذي تتخذ فيه قرارات العلاج التي تخص نظام CGM، كما هو الحال عند استخدامك لمقياس الجلوكوز بالدم. على سبيل المثال، إذا كان مستوى الجلوكوز لديك مرتفعاً ويرتفع قبل النوم مباشرة، فاضبط جرعة الأنسولين وفقاً لتوصيات مزود الرعاية الصحية الخاص بك. وضع في اعتبارك أيضاً كيفية العلاج إن كنت تخطط لممارسة التمارين أو كنت ستجلس في اجتماع طوال اليوم. قد يوصيك مزود الرعاية الصحية بتعديل قرار العلاج الخاص بك بناءً على ما يوشك حدوثه من أجل تجنب التعرض للجلوكوز المرتفع أو المنخفض.

اتخاذ قرارات العلاج باستخدام E3

لاتخاذ قرار علاج، يجب أن تضع في اعتبارك ما يلي:


- معلومات شريط الحالة.
- القيمة الحالية لمستشعر الجلوكوز - يتم عرض القيمة الحالية للجلوكوز باللون الأسود.
- سهم الاتجاه - يجب عرض سهم الاتجاه.
- أحدث معلومات الاتجاه والتنبيهات.

7

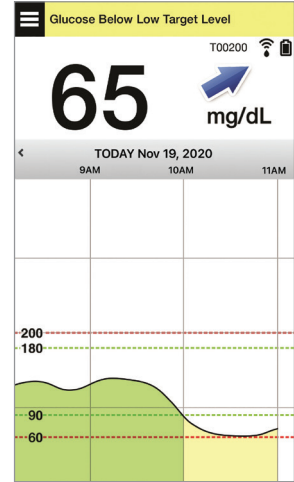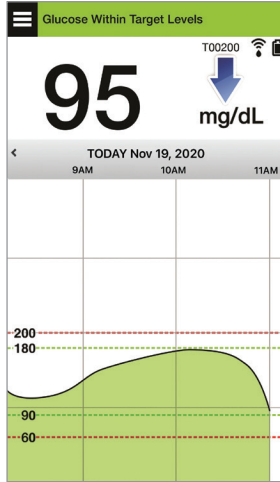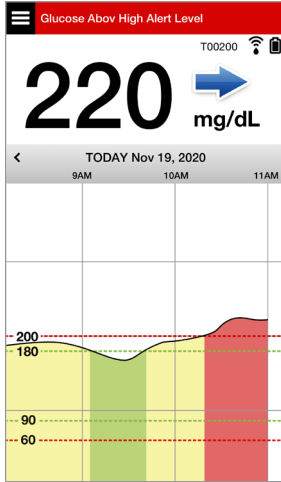

متى لا يجوز اتخاذ قرار علاج:

- عند عدم عرض قيمة الجلوكوز.
- عند عدم عرض سهم الاتجاه.
- عندما لا تتطابق أعراضك مع معلومات الجلوكوز المعروضة.
- عند عرض قيمة الجلوكوز بالمستشعر باللون الرمادي.
- عند عرض شريط الحالة باللون البرتقالي.
- إن كنت تتناول أدوية من نوع التتراسيكلين.

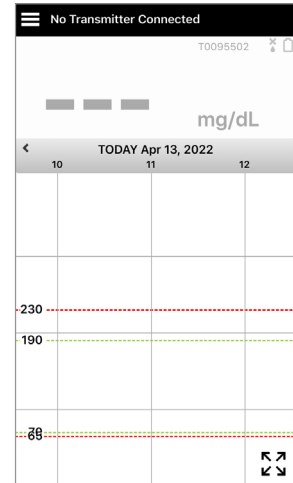

ملاحظة: ارجع دائماً إلى معلومات الجلوكوز في تطبيق Eversense CGM App على جهازك الذكي لاتخاذ قرارات العلاج. لا تستخدم شاشة ثانوية مثل Apple Watch أو Eversense NOW.

أسهم الاتجاه وقرارات العلاج فيما يخص Eversense E3

تُظهر أسهم اتجاه Eversense E3 اتجاه التغيير في الجلوكوز ومعدله، لمنحك فكرة حول اتجاه الجلوكوز لديك. تحدث مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك حول استخدام أسهم الاتجاه لمساعدتك في اتخاذ قرارات العلاج. بشكل عام، إذا كان السهم متجهًا لأسفل، فقد تضع في اعتبارك تناول كمية أقل من الأنسولين، وإذا كان سهم الاتجاه متجهًا لأعلى، فقد تضع في اعتبارك تناول المزيد من الأنسولين. واحرص على عدم تناول الكثير من الأنسولين في وقت قصير، لأن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الجلوكوز نتيجة تكس الأنسولين. أسهم Eversense E3 مدرجة أدناه، جنبًا إلى جنب مع كيفية استخدامك لها عند الشروع في العلاج. تحدث مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك حول إجراء تعديلات على العلاج بناءً على أسهم الاتجاه. لا تتخذ قرار علاج بالاستعانة بنظام CGM، إن لم يتم عرض أي سهم.

الجلوكوز ضمن النطاق	جلوكوز مرتفع	جلوكوز منخفض	معناها	أسهم اتجاه Eversense E3
			لا توجد بيانات كافية لحساب اتجاه الجلوكوز أو معدل التغيير.	لا يوجد سهم اتجاه
ضع الكربوهيدرات ضمن خطة العلاج، وتناولها إن قد انتهيت للتو من ممارسة تمرين، أو إذا كنت تناولت جرعة كبيرة من الأنسولين.	إن كنت قد تناولت الأنسولين مؤخرًا أو كنت تنوي ممارسة تمرين، فانظر وافحص قيمة CGM وسهم الاتجاه بشكل متكرر قبل اتخاذ قرار العلاج.	ضع الكربوهيدرات ضمن خطة العلاج، وتناولها إن قد انتهيت للتو من ممارسة تمرين، أو إذا كنت تناولت جرعة كبيرة من الأنسولين.	قد ينخفض مستوى الجلوكوز لديك بمقدار 30 mg/dL أو أكثر خلال 15 دقيقة.	↓
			يمكن أن ينخفض الجلوكوز ما بين 15 و 30 mg/dL خلال 15 دقيقة.	↘

الجلوكوز ضمن النطاق	جلوكوز مرتفع	جلوكوز منخفض	معناها	أسهم اتجاه Eversense E3	
إن كنت قد تناولت الأنسولين مؤخرًا أو كنت تنوي ممارسة تمرين، فانظر وافحص قيمة CGM وسهم الاتجاه بشكل متكرر قبل اتخاذ قرار العلاج.	إن كنت قد تناولت الأنسولين مؤخرًا أو كنت تهتم بممارسة تمرين، فانظر وافحص قيمة CGM وسهم الاتجاه بشكل متكرر.	إن كنت قد تناولت الأنسولين مؤخرًا أو كنت تنوي ممارسة تمرين، فانظر وافحص قيمة CGM وسهم الاتجاه بشكل متكرر قبل اتخاذ قرار العلاج.	قد يرتفع مستوى الجلوكوز لديك بمقدار 30 mg/dL أو أكثر خلال 15 دقيقة.	الجلوكوز يرتفع بمعدل سريع ($> 2.0 \text{ mg/dL/minute}$).	
إن لم تكن قد تناولت أنسولين حديثًا، أو انتهيت من ممارسة تمرين، فضع في اعتبارك تعديل جرعة الأنسولين الخاصة بك.	إن لم تكن تناولت أنسولين مؤخرًا، ولم تكن على وشك ممارسة تمرين، فضع في اعتبارك تعديل جرعة الأنسولين الخاصة بك.	يمكن أن يرتفع الجلوكوز ما بين 30 mg/dL و 15 خلال 15 دقيقة.	يرتفع بمعدل متوسط (بين 1.0 و 2.0 mg/dL/minute).		
بدون علاج، لكن إن كنت قد تناولت الأنسولين مؤخرًا أو كنت تهتم بممارسة تمرين، فافحص قيمة CGM وسهم الاتجاه بشكل متكرر.	إن كنت قد تناولت الأنسولين مؤخرًا أو كنت تهتم بممارسة تمرين، فانظر وافحص قيمة CGM وسهم الاتجاه بشكل متكرر.	ضع في اعتبارك وضع الكربوهيدرات ضمن خطة العلاج. إن كنت قد تناولت الأنسولين مؤخرًا، فافحص قيمة CGM وسهم الاتجاه بشكل متكرر.	يمكن أن يرتفع الجلوكوز أو ينخفض إلى 15 mg/dL خلال 15 دقيقة.	يتغير الجلوكوز تدريجيًا (1.0 mg/dL/minute أو أقل).	
	في حالة عدم تناول أنسولين مؤخرًا، عليك التفكير في تعديل جرعة الأنسولين الخاصة بك.				

ماذا يجب أن تفعل

يقدم هذا القسم أمثلة حول بعض المواقف التي قد تتعرض لها. ومن المهم التفكير فيما حدث وما سيحدث عند اتخاذ قرارات العلاج مع CGM. راجع هذه الأمثلة بعناية، وفكر فيما قد تضعه في اعتبارك قبل اتخاذ قرار علاج. إن لم تكن متأكدًا، فافحص دائمًا الجلوكوز في الدم بوخز الإصبع، قبل اتخاذ قرار العلاج.



الجلوكوز أقل من النطاق المستهدف عند 65، ولكن يزداد باعتماد. يمكن أن يصل الجلوكوز لديك إلى 120 خلال 30 دقيقة.

إنها التاسعة صباحًا، وأخذت جرعة الأنسولين المحددة لوجبة الإفطار منذ حوالي ساعتين.

- هل يجب عليك الانتظار ومراقبة قيمة الجلوكوز وسهم الاتجاه لديك قبل اتخاذ قرار العلاج؟
- هل يجب التخطيط لتناول الكربوهيدرات لعلاج الجلوكوز المنخفض الآن؟

الساعة السابعة صباحًا، وأنت على وشك تناول وجبة الإفطار، وشربت كوبًا صغيرًا من عصير البرتقال بمجرد أن استيقظت من النوم.

- هل يجب أن تخطط لتناول أنسولين أقل مما اعتدت الحصول عليه عند تناولك لوجبة الإفطار؟
- هل يجب عليك الحصول على جرعة الأنسولين التي تحصل عليها عادةً لوجبة الإفطار هذه، وتراقب قيمة الجلوكوز لديك وسهم الاتجاه وكيف تشعر؟

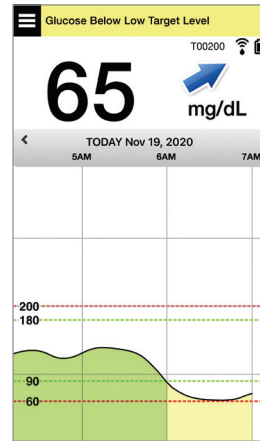
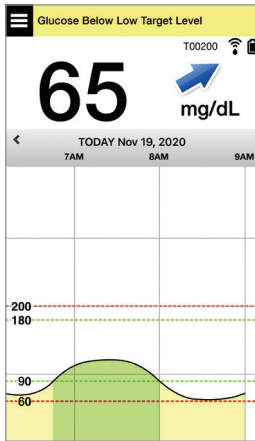


الجلوكوز ضمن النطاق المستهدف عند 90، ولكن يزداد بسرعة. قد يصل الجلوكوز إلى 180 أو أعلى خلال 45 دقيقة.

- إنها الساعة الثانية ظهرًا، وقد تناولت جرعة الأنسولين لتغطية وجبة الغداء، بالإضافة إلى جرعة إضافية بسيطة نتيجة ارتفاع السهم بسرعة، منذ حوالي 90 دقيقة.
- حيث إنه لم يمض سوى 90 دقيقة منذ آخر جرعة أنسولين، هل يجب أن تنتظر وتراقب قيمة الجلوكوز وأسهم الاتجاه؟
- ما المدة التي يوصي مزود الرعاية الصحية بانتظارها بين جرعات الأنسولين لتجنب تكديس الأنسولين؟

إنها فترة الظهر، وأنت على وشك تناول وجبة الغداء.

- ما السبب وراء حدوث هذه الزيادة في الجلوكوز؟
- هل يجب التفكير في تناول أنسولين أكثر مما اعتدت تناوله عند تناولك لوجبة الغداء؟
- ما الذي قد يوصي به مزود الرعاية الصحية من أجل ضبط جرعة الأنسولين في هذه الحالة؟

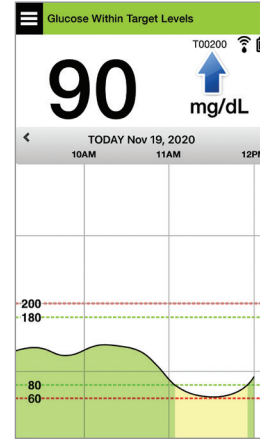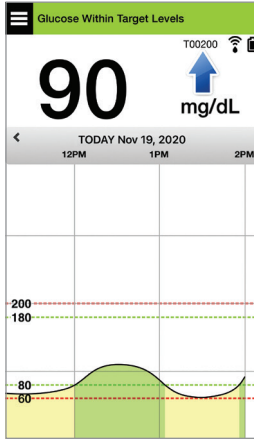



الجلوكوز ضمن النطاق المستهدف عند 95، ولكنه يقل بسرعة. يمكن أن يصل مستوى الجلوكوز لديك إلى 65 أو أقل خلال 15 دقيقة.

أنت على وشك بدء التمرين.

- ما السبب وراء حدوث هذا الانخفاض السريع في مستوى الجلوكوز؟
- ضع في اعتبارك تناول وجبة خفيفة لمنع حدوث انخفاض الجلوكوز.
- ضع في اعتبارك تأجيل التمرين حتى يُصبح سهم الاتجاه ومستوى الجلوكوز أكثر ثباتًا. راقب بحرص مستوى الجلوكوز وسهم الاتجاه وبما تشعر.


لقد انتهيت للتو من التمرين.

- ما الذي يوصيك به مزود الرعاية الصحية لمنع انخفاض الجلوكوز بعد أداء التمرين؟
- ضع في اعتبارك تناول وجبة خفيفة لمنع حدوث انخفاض الجلوكوز.
- راقب بحرص مستوى الجلوكوز وسهم الاتجاه وبما تشعر.

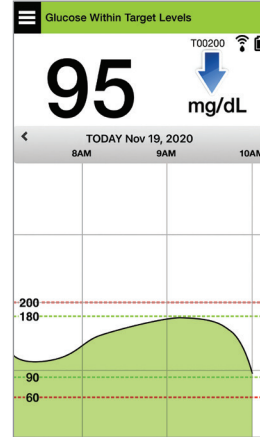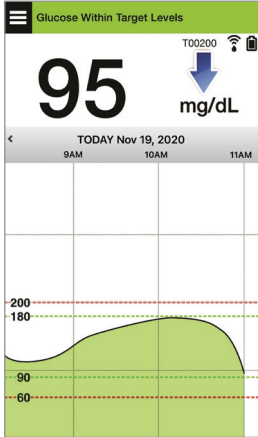


الجلوكوز أعلى من مستوى التنبيه المرتفع عند 220، ويتغير تدريجيًا. يمكن أن ينخفض مستوى الجلوكوز لديك إلى 190 أو يرتفع إلى 250 خلال 30 دقيقة.

- إنها الساعة العاشرة مساءً، وأنت على وشك الذهاب للنوم. مرت ساعتان ونصف منذ آخر جرعة أنسولين.
- ما السبب وراء حدوث هذا الارتفاع في مستوى الجلوكوز؟
- كم يستغرق الأنسولين الذي تستخدمه عادةً لخفض مستوى الجلوكوز؟
- ما مستوى الجلوكوز الذي أوصاك مزود الرعاية الصحية بالحفاظ عليه عند الذهاب للنوم؟
- كيف تعالج عادةً ارتفاع الجلوكوز في وقت النوم؟

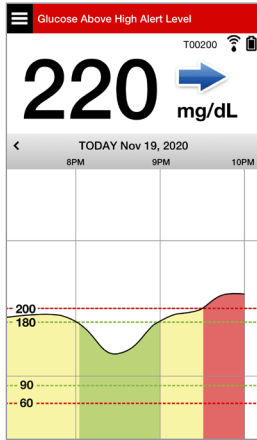

- إنها السابعة مساءً، وأنت على وشك تناول وجبة العشاء. لقد مرت 6 ساعات منذ أخذ جرعة الأنسولين في الغداء.
- ما الذي قد يجعل الجلوكوز مرتفعًا لفترة طويلة بعد تناول آخر وجبة؟
- هل كان يومك عصيبًا، هل تشعر أنك لست على ما يرام؟
- هل عليك التخطيط لأخذ مزيد من الأنسولين أو تناول كربوهيدرات أقل من المعتاد لهذه الوجبة؟

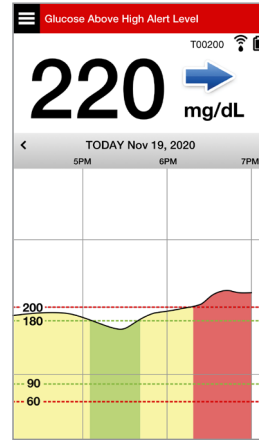


تذكر، إن لم تكن متأكدًا، فقم دائمًا بإجراء فحص بوخز الإصبع عبر مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

الرسم البياني للاتجاه

يُستخدم الرسم البياني للاتجاه لمراجعة وتحليل ذاكرة البيانات والاتجاهات في قيم الجلوكوز الخاصة بك مع الوقت. كما يعرض علامات للأحداث التي سجلتها يوميًا في التطبيق (مثل اختبارات المعايرة والتمارين).

هناك عدة طرق لاستخدام الرسم البياني للاتجاه:

- المراجعة السريعة لحالتك بالمقارنة مع أهداف الجلوكوز ومستويات التنبيه التي تحددها. تشير الخطوط الحمراء المتقطعة إلى مستويات تنبيه الجلوكوز المرتفعة والمنخفضة، وتشير الخطوط الخضراء المتقطعة إلى مستويات الجلوكوز المستهدفة المرتفعة والمنخفضة (النطاق المستهدف).
- المناطق المظلمة في الرسم البياني ذات رموز لونية على النحو التالي وفقًا لإعدادات الجلوكوز التي تقوم بإدخالها:

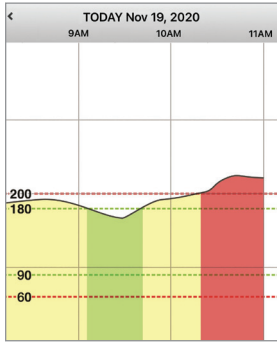

- قيم الجلوكوز التي **تقع خارج مستويات تنبيه الجلوكوز الخاصة بك** ستكون باللون الأحمر.
 - قيم الجلوكوز التي **تقع ضمن مستويات الجلوكوز المستهدفة الخاصة بك** ستكون باللون الأخضر.
 - قيم الجلوكوز التي **تقع بين مستويات الجلوكوز المستهدفة ومستويات التنبيه الخاصة بك** ستكون باللون الأصفر.
 - اضغط باستمرار على أي نقطة في الرسم التخطيطي لتعرض قراءة معينة للجلوكوز لتلك النقطة الزمنية.
 - اضغط على أي من العلامات على شاشة التطبيق لتحصل على المزيد من المعلومات عن الحدث أو التنبيه.
 - قم بتصغير الشاشة أو تكبيرها لتعرض نطاقات مختلفة لليوم/الزمن على الرسم البياني للاتجاه. يمكنك التكبير والتصغير لتعرض مدة قليلة تصل إلى 3 ساعات أو حتى 3 أيام من المعلومات.
 - لتعرض بيانات الرسم البياني للاتجاه لتاريخ مختلف، اضغط على التاريخ على الشاشة وأدخل التاريخ المرغوب فيه.
 - يمكنك عرض الرسم البياني للاتجاه إما في وضع طولي أو عرضي. في الوضع العرضي، هناك أزرار اختصار لتري عرض 7 أيام و14 و30 و90 يومًا.
- ملاحظة:** سيتم تخزين كل بيانات الجلوكوز الخاصة بك في التطبيق طالما ستكون لديك ذاكرة متاحة على جهازك المحمول.

خيارات القائمة

تظهر أيقونة القائمة (☰) في الركن العلوي الأيسر على كل شاشات التطبيق وتقدم إمكانية تنقل سهلة إلى ميزات التطبيق الأخرى. تتوفر عناصر القائمة التالية:

الوصف	خيارات القائمة	
شاشة التطبيق الرئيسية التي تعرض القراءة الحالية لمراقبة الجلوكوز المستمرة والاتجاه ومعدل التغير والرسم البياني للاتجاه والأحداث والتنبيهات.	My Glucose	
إدخال قيم معايرة الجلوكوز بالدم بوخز الإصبع.	Calibrate	
لاستعراض التنبيهات والإشعارات السابقة. انظر وصف التنبيهات للاطلاع على المزيد من المعلومات.	Alert History	
أدخل معلومات حول الأنشطة مثل قيم جلوكوز الدم والوجبات والأنسولين والصحة والتمارين. انظر سجل الأحداث للاطلاع على المزيد من المعلومات.	Event Log	
استعرض عدة تقارير حول بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة لديك. انظر التقارير للاطلاع على المزيد من المعلومات.	Reports	
السماح للأخرين بروية بيانات الجلوكوز الخاصة بك من خلال تطبيق الجهاز المحمول Eversense NOW Mobile App.	Share My Data	
تحقق من الاتصال بين جهاز الإرسال الذكي والمستشعر. استخدم هذه الشاشة عندما تقوم بتركيب جهاز الإرسال الذكي لكي تتأكد من إنشاء الاتصال.	Placement Guide	
قم بإنشاء اتصال بين جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول أو تحقق منه. مطلوب اتصال Bluetooth لإرسال البيانات إلى التطبيق.	Connect	
قم بتخصيص الإعدادات مثل مستويات الجلوكوز المستهدفة ومستويات التنبيه والأصوات والملف التعريفي المؤقت. انظر تخصيص إعداداتك للاطلاع على المزيد من المعلومات.	Settings	
لعرض معلومات حول نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة لديك، بما في ذلك رقم معرف المستشعر ومعرف جهاز الإرسال الذكي. قم بتغيير صورة الملف الشخصي الخاص بك أو احذفها، وسجل الخروج من التطبيق.	About	

8. تخصيص إعداداتك

يصف هذا القسم كيفية تخصيص الإعدادات في نظام Eversense E3 CGM الخاص بك.

تشمل المجالات حيث يمكنك تخصيص إعدادات التطبيق ما يلي:

- **Glucose** - مستويات الجلوكوز ومعدلات التغيير التي ستؤدي إلى إطلاق تنبيه.
- **Calibration Reminders** - تحدد اختياريًا أوقات تنبيهات المعايرة.
- **System** - يحدد معلومات مخصصة حول نظامك أو يتيح لك إمكانية إدخالها.
- **Sound Settings** - لتغيير الأصوات لبعض تنبيهات الجلوكوز وضبط أوقات الغفوة ووضع عدم الإزعاج.
- **Temp Profile** - لضبط ملف شخصي مؤقت للجلوكوز.

مستويات الجلوكوز

صُمم نظام Eversense E3 CGM لتوفير تنبيهات على جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول الخاصين بك عندما تصل مستويات الجلوكوز لديك إلى مستويات التنبيه التي حددتها. ستحدد إعدادات تنبيهات الجلوكوز الخاصة بك والقيم المستهدفة ومعدلات التغيير بناء على معلومات ستحصل عليها من مقدم رعايتك الصحية.

تحذير: صممت تنبيهات ارتفاع الجلوكوز وانخفاضه لتساعدك على التعامل مع إصابتك بالسكري وينبغي عدم استخدامها وحدها لاكتشاف انخفاض سكر الدم أو ارتفاع سكر الدم. ينبغي استخدام التنبيهات دائمًا بالتزامن مع المؤشرات الأخرى لحالة نسبة السكر مثل مستوى الجلوكوز والاتجاه والرسم البياني الخطي وغير ذلك.

مهم:

- تختلف تنبيهات انخفاض الجلوكوز وارتفاعه عن الأهداف التي حددتها للجلوكوز المنخفض والمرتفع.
- تيلغك تنبيهات انخفاض الجلوكوز وارتفاعه على جهازك المحمول وجهاز الإرسال الذكي الخاص بك عندما تصل لقيمة منخفضة أو مرتفعة معينة.
- تُستخدم أهداف الجلوكوز في التقارير والرسوم البيانية الخطية لتبين كيف كان أداء مستويات الجلوكوز لديك بالمقارنة مع الأهداف التي حددتها. لن تتلقى تنبيهاً عندما تصل إلى مستويات الجلوكوز المستهدفة لديك.
- تُعلمك التنبيهات التنبؤية بانخفاض الجلوكوز وارتفاعه على جهازك المحمول وجهاز الإرسال الذكي متى يُحتمل أن يصل الجلوكوز لديك إلى مستويات التنبيه بالجلوكوز المنخفض والمرتفع التي قمت بإعدادها.

8

وفي شاشة **Glucose Settings** اضغط على "carat symbols" ✓ لتوسيع خيارات الإعدادات وطبها.

Glucose Within Target Levels	
< Settings	Glucose
Glucose Alerts	▼
Set the glucose levels at which you'd like the system to alert you if reached.	
Target Range	▼
Set the glucose levels you'd like to remain between.	
Predictive Alerts	▼
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will reach the Glucose Alert Threshold.	
Rate Alerts	▼
Be alerted when your sensor glucose is changing (rising or falling) at or faster than the speed you set.	

ضبط مستويات تنبيه الجلوكوز

سينبهك نظام Eversense E3 CGM عندما تتجاوز مستويات الجلوكوز إعدادات التنبيه التي اخترتها. عندما تتجاوز مستويات تنبيه الجلوكوز المنخفض والمرتفع الخاصة بك، يصدر جهاز الإرسال الذكي ذبذبة ويعطي تطبيق الجهاز المحمول إنذارًا صوتيًا إلى جانب عرض رسالة على الشاشة.

<p>منخفض: 65 mg/dL مرتفع: 250 mg/dL</p> <p>يمكنك تغيير مستويات التنبيه هذه بناءً على ما تتفق عليه مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك باعتبارها المستويات المناسبة لك. لا يمكن تعيين تنبيه انخفاض الجلوكوز على مستوى أعلى من مستوى الجلوكوز المنخفض المستهدف، ولا يمكن تعيين تنبيه ارتفاع الجلوكوز على مستوى أقل من مستوى الجلوكوز المرتفع المستهدف.</p>	<p>الإعداد الافتراضي</p>
<p>منخفض: 60 - 115 mg/dL مرتفع: 125 - 350 mg/dL</p>	<p>الإعداد المسموح به</p>
<p>إعداد "Low Glucose Alert" دائمًا على الوضع ON إعداد "High Glucose Alert" يمكن ضبطه على الوضع ON أو OFF. ولن يتم عرض تنبيهات أو اهتزازات للجلوكوز المرتفع على جهاز الإرسال الذكي إن تم إيقاف تشغيل هذه الميزة.</p>	<p>إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل</p>
<p>الإشعار الصوتي والتنبيهات البصرية في جهازك المحمول والتنبيهات المذبذبة على الجسم من جهاز الإرسال الذكي.</p>	<p>ملاحظات</p>



مهم:

- إن مستويات تنبيه الجلوكوز المرتفع والمنخفض التي تقوم بإعدادها هي نفسها المستويات المستخدمة لتقديم التنبيهات التنبؤية. انظر هذا القسم، *إعدادات التنبيهات التنبؤية*.
- لنظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث، وAndroid 6 والإصدارات الأحدث، يمكنك السماح لتنبيهات "الجلوكوز منخفض" و"انخفاض الجلوكوز للغاية" لـ Eversense، بتجاوز إعدادات الصوت بهاتفك. انظر *إعدادات الصوت للاطلاع على المزيد من المعلومات*.

2. من Glucose Alert Levels، اضغط على High Alert

وحدد مستوى التنبيه لارتفاع الجلوكوز.


- اضغط على Done عندما تنتهي.
- كرر الخطوة لتحديد اختيار Low Alert.

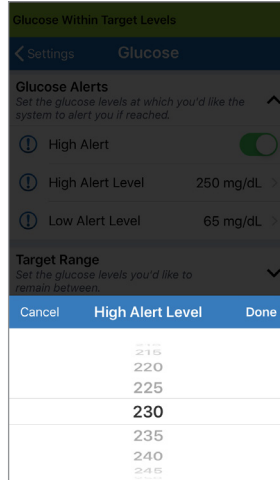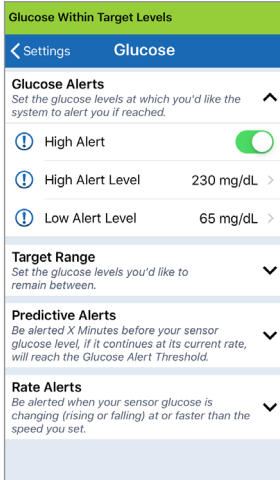

1. اضغط على Menu > Settings > Glucose

لعرض شاشة

.GLUCOSE SETTINGS

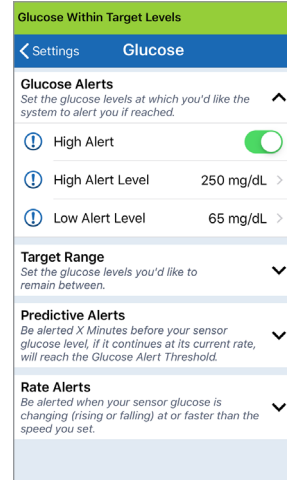

ضبط مستويات الجلوكوز المستهدفة

أهداف الجلوكوز هي المستويات المنخفضة والمرتفعة للنطاق الذي تهدف إلى تحقيقه طوال اليوم. تُستخدم هذه الإعدادات في التطبيق لتشير متى تكون قيم الجلوكوز ضمن نطاقك المستهدف.

الإعداد الافتراضي	منخفض: 70 mg/dL مرتفع: 180 mg/dL يمكنك تغيير هذا النطاق المستهدف بناء على ما تتفق عليه مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك باعتباره المستويات المستهدفة المناسبة لك.
الإعداد المسموح به	منخفض: 65 - 120 mg/dL مرتفع: 120 - 345 mg/dL
إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل	التشغيل دائماً (لا يمكن إيقاف تشغيله)
ملاحظات	تُستخدم في الرسوم البيانية والتخطيطية على التطبيق لتوضيح الوقت المنقضي في النطاق المستهدف.

2. من **Glucose Target Levels**، اضغط على **High Target** وحدد المستوى المستهدف للجلوكوز المرتفع المناسب لحالتك.

- اضغط على **Done** عندما تنتهي.
- كرر الخطوة لتحديد اختيار **Low Target**.

Glucose Within Target Levels

< Settings **Glucose**

Glucose Alerts
Set the glucose levels at which you'd like the system to alert you if reached. ✓

Target Range
Set the glucose levels you'd like to remain between. ^

High Target 190 mg/dL >

Low Target 70 mg/dL >

Predictive Alerts
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will reach the Glucose Alert Threshold. ✓

Rate Alerts
Be alerted when your sensor glucose is changing (rising or falling) at or faster than the speed you set. ✓

Glucose Within Target Levels

< Settings **Glucose**

Glucose Alerts
Set the glucose levels at which you'd like the system to alert you if reached. ✓

Target Range
Set the glucose levels you'd like to remain between. ^

High Target 180 mg/dL >

Low Target 70 mg/dL >

Predictive Alerts
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will reach the Glucose Alert Threshold. ✓

Cancel **High Target** Done

175

180

185

190

195

200

205

1. اضغط على **Menu > Settings > Glucose** لعرض شاشة **GLUCOSE SETTINGS**.

Glucose Within Target Levels

< Settings **Glucose**

Glucose Alerts
Set the glucose levels at which you'd like the system to alert you if reached. ✓

Target Range
Set the glucose levels you'd like to remain between. ^

High Target 180 mg/dL >

Low Target 70 mg/dL >

Predictive Alerts
Be alerted X Minutes before your sensor glucose level, if it continues at its current rate, will reach the Glucose Alert Threshold. ✓

Rate Alerts
Be alerted when your sensor glucose is changing (rising or falling) at or faster than the speed you set. ✓

ضبط التنبيهات التنبؤية



تتيح لك التنبيهات التنبؤية أن تعرف مسبقاً أنه من المرجح ظهور حدث ارتفاع أو انخفاض الجلوكوز إذا استمرت الاتجاهات الحالية. تستخدم التنبيهات التنبؤية مستويات تنبيه الجلوكوز المنخفض والمرتفع المضبوطة مسبقاً لتقديم إنذار "مبكر". ويمكنك إعداد وقت الإنذار المبكر على (10 أو 20 أو 30 دقيقة) لتنبيهك مسبقاً قبل الوصول إلى مستويات التنبيه، بناءً على اتجاهات الجلوكوز الحالية لديك. عندما تصل إلى وقت الإنذار المبكر، يصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبذة ويعطي تطبيق الهاتف المحمول إنذاراً صوتياً إلى جانب عرض رسالة على الشاشة.

8


الإعداد الافتراضي	OFF (إيقاف التشغيل)
الإعداد المسموح به	قبل 10 أو 20 أو 30 دقيقة
إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل	يمكنك تغيير هذه التنبيهات إلى ON و OFF. لن تحدث تنبيهات تنبؤية قبل تشغيل هذه الميزة. القيمة الافتراضية هي 20 دقيقة.
ملاحظات	الإشعار الصوتي والتنبيهات البصرية في جهازك المحمول والتنبيهات المذبذبة على الجسم من جهاز الإرسال الذكي.

2. وجوار شريحة **the High and Low Predictive Alerts** .
قم بضبط الزر **OFF** على **ON** .

3. اضغط على **Minutes** لتحديد مدة الإنذار المبكر .
• اضغط على **Done** عندما تنتهي.

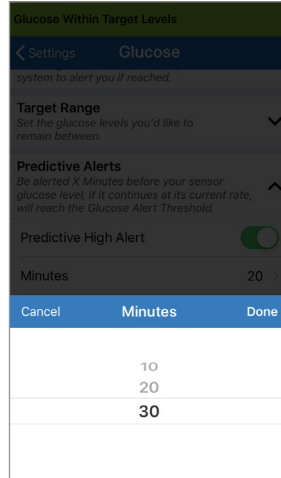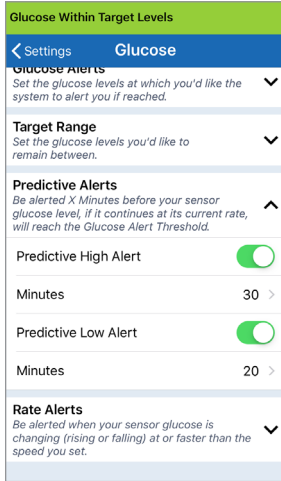

1. لتشغيل هذه الميزة، اضغط على **Menu > Settings > Glucose** لعرض شاشة **.GLUCOSE SETTINGS**

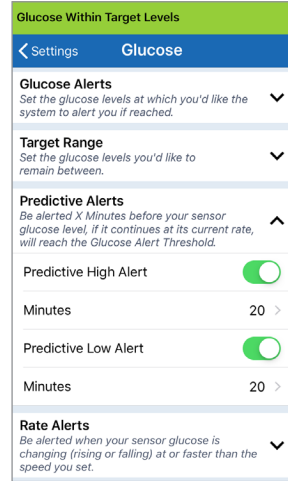

ضبط تنبيهات معدل التغير

تتيح لك تنبيهات معدل التغير معرفة متى تنخفض مستويات الجلوكوز لديك أو ترتفع بشكل أسرع من إعداد تنبيه معدل التغير الذي اخترته.




الإعداد الافتراضي	OFF (إيقاف التشغيل)
الإعداد المسموح به	5 mg/dL - 1.5 في الدقيقة
إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل	يمكنك تغيير هذه التنبيهات إلى ON وOFF. لن تحدث تنبيهات معدل التغير قبل تشغيل هذه الميزة.
ملاحظات	الإشعار الصوتي والتنبيهات البصرية في جهازك المحمول والتنبيهات بالاهتزاز من جهاز الإرسال.

1. لتشغيل هذه الميزة، اضغط على **Menu > Settings > Glucose** لعرض شاشة **.GLUCOSE SETTINGS**

2. وجوار شريحة **Rate Alerts**، قم بضبط الزر **OFF** على **ON**.

3. اضغط على **Rate of Change** لتحديد المعدل.

• اضغط على **Done** عندما تنتهي.

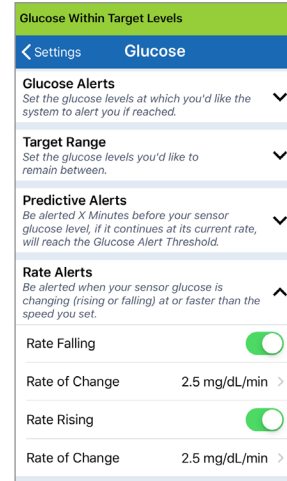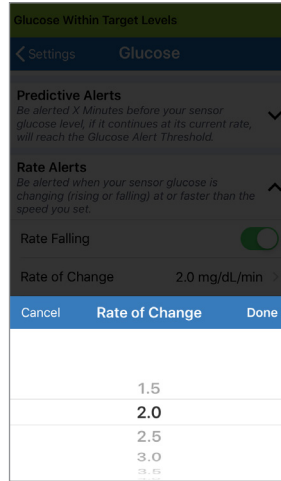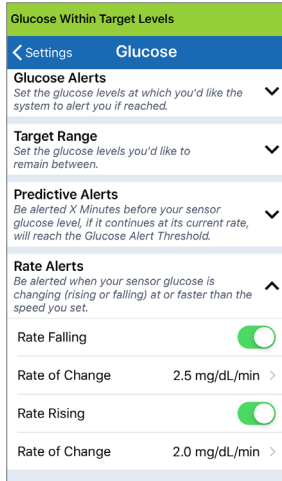

تعيين تذكيرات المعايرة اليومية

يمكنك تعيين تذكيرات المعايرة اختياريًا في الأوقات التي تناسبك أكثر. وستظل تتلقى إشعارات وتنبهات المعايرة الصادرة عن النظام.

الإعداد الافتراضي	OFF (إيقاف التشغيل)
الإعداد المسموح به	الوقت من اليوم بزيادات قدرها 1 دقيقة
إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل	يمكنك ضبط هذه الميزة على الوضع ON أو OFF. ولن يتم عرض تذكيرات ما لم يتم ضبط هذه الميزة على الوضع ON.
ملاحظات	يمكنك تعيين تذكير يومي واحد أو اثنين. الإشعارات الصوتية والتنبيهات المرئية على شاشة هاتفك فقط - بدون اهتزازات لجهاز الإرسال. إن قمت بحذف تطبيق الجهاز المحمول وأعدت تثبيته، فيجب إعادة تعيين هذه التذكيرات. لا تُحفظ هذه التذكيرات في Alert History. إن قمت بإقران جهاز إرسال جديد مع التطبيق الحالي، فستظل الإعدادات كما هي. انظر إعداد <i>Do Not Disturb</i> في تطبيق <i>Eversense App</i> والأجهزة المحمولة للحصول على مزيد من المعلومات.

تتيح لك شاشة **SYSTEM** إمكانية عرض الإعدادات الأخرى وتعديلها في نظام Eversense E3 CGM الخاص بك.

1. اضغط على **SYSTEMS** شاشة **Menu > Settings > System** لعرض شاشة **SYSTEMS**.

Glucose Within Target Levels	
Settings System	
Glucose Units	mg/dL
Name	T0095502 >
Linked Sensor	221984 >

2. في شاشة **SYSTEMS** يمكنك الضغط على كل مما يلي لضبط:

- **Glucose Units**. وحدة القياس لقراءات الجلوكوز الخاصة بك. يجب إعادة تثبيت التطبيق لتعديل هذا الإعداد.
- **Name**. الرقم التسلسلي لجهاز الإرسال الذكي الخاص بك. يمكنك أيضًا الضغط على الرقم التسلسلي المعروض هنا وإعطاء اسم مخصص لجهاز الإرسال الذكي الخاص بك.
- **Linked Sensor**. الرقم التسلسلي للمستشعر المرتبط حاليًا بجهاز الإرسال الذكي. اضغط على هذه الميزة للتمكن من ربط مستشعر أو إعادة ربطه.

مهم: لا تعد ربط المستشعر ما لم يوجهك ممثل دعم العملاء بذلك. تؤدي إعادة ربط المستشعر إلى إعادة النظام إلى مرحلة التهيئة، مما يتطلب إجراء 4 معايرات لجلو كوز الدم بوخز الإصبع خلال 36 ساعة.

4. اضغط على **Cancel** أو **OK** للمتابعة.

IMPORTANT

DO NOT re-link the sensor unless instructed by Customer Care.
Re-linking the sensor will return the system to Initialisation Phase and 4 fingerstick calibrations are required within 36 hours.

Please keep your transmitter over the sensor during the re-link process.
Do you wish to continue?

Cancel

OK

5. اضغط على **Cancel** أو **Re-link**.

Confirm

Re-linking the sensor will return the system to Initialisation Phase and 4 fingerstick calibrations are required within 36 hours.

DO NOT re-link unless instructed by Customer Care.

Cancel

Re-link

3. اضغط على **Re-link detected sensor**.



Glucose Within Target Levels	
System	Linked Sensor
Linked Sensor	221984
Detected Sensor	221984
Re-Link Detected Sensor	>

1. تأكد من دعم العملاء أنه يجب عليك إعادة ربط المستشعر.


2. اضغط على **Linked Sensor**.

Glucose Within Target Levels	
Settings	System
Glucose Units	mg/dL
Name	T0095502 >
Linked Sensor	221984 >

6. ستبدأ عملية الربط. ستظهر إلى جانب كل خطوة علامة اختيار عندما تنتهي. قد يستغرق اكتمال العملية مدة تصل إلى 10 دقائق. لا تنزع جهاز الإرسال الذكي من موضع الإدخال لديك قبل أن تظهر علامة الاختيار الثالثة.

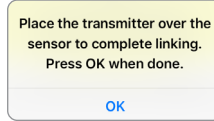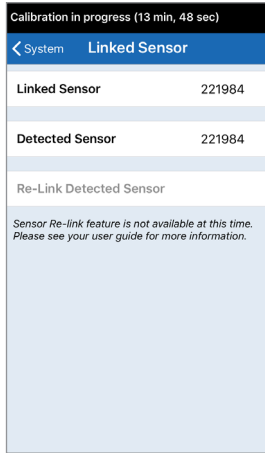

إذا تم نزع جهاز الإرسال الذكي من موضع المستشعر، فسيعرض النظام إشعاراً.

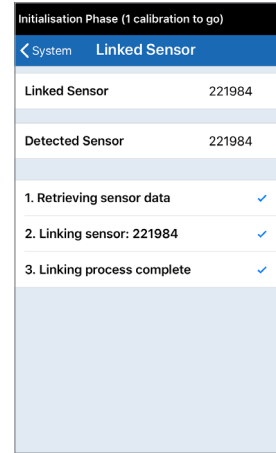

8

ملاحظة: لن يكون زر re-link متوفراً في الحالات التالية:

- عندما تكون بطارية جهاز الإرسال لديك بحاجة للشحن أو فارغة.
- عندما تكون المعايرة قيد التقدم.
- قبل ربط المستشعر.
- عند وجود تنبيهات معينة لاستبدال المستشعر.
- إن كان أحد التنبيهات التالية نشطاً:

- Transmitter End of Life
- System Time Error
- Sensor Suspend

ضبط الأصوات


تعرض شاشة **SOUND SETTINGS** إعدادات صوت التنبيه للجلوكوز المنخفض والجلوكوز المرتفع. تسمح لك هذه الشاشة أيضاً بإدخال إعداد غفوة للتنبيهات المدرجة، وخيار تفعيل تنبيهات الجلوكوز المنخفض وانخفاض الجلوكوز للغاية لتجاوز إعدادات الصوت لديك (الإصدار iOS 12 والإصدارات الأحدث، وإصدار Android 6 والإصدارات الأحدث).

بتعيين تنبيه الغفوة، يمكنك تعيين عدد تكرارات التنبيه بعد تلقي تنبيه انخفاض الجلوكوز وارتفاعه.


3. اضغط على كل تنبيه غفوة

لضبط مدى تكرار التنبيه.


• اضغط على **Done** عندما تنتهي.

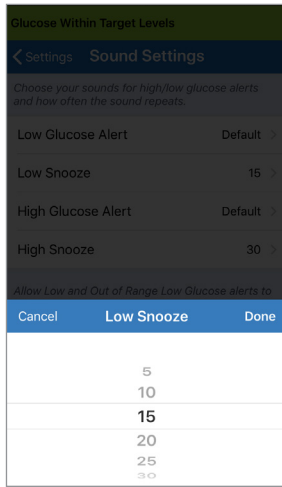

2. اضغط على كل تنبيه لتحديد صوت التنبيه. اضغط على **Back** للعودة إلى شاشة **SOUND SETTINGS**.

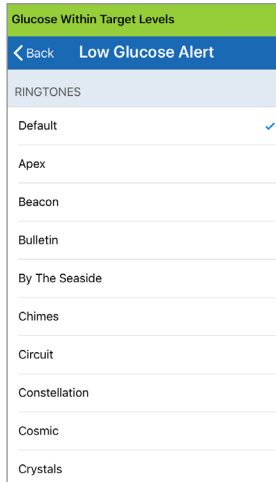

1. اضغط على **Menu > Settings > Sound Settings** لعرض شاشة **SOUND SETTINGS**.

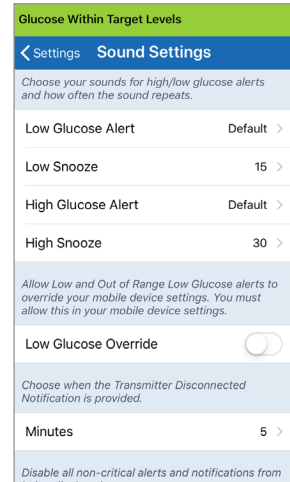

مهم: احرص على تشغيل الصوت في جهازك المحمول. إذا أوقفت تشغيل الصوت في جهازك المحمول، فلن تسمع أي أصوات من التطبيق.


إعداد تجاوز الجلوكوز المنخفض

إن كان جهازك المحمول يعمل بنظام التشغيل iOS 12 فما أحدث، أو نظام التشغيل Android 6 فما أحدث، يمكنك اختيارياً السماح لتنبهات الجلوكوز المنخفض وانخفاض الجلوكوز خارج النطاق من Eversense بتجاوز إعدادات الصوت لجهازك المحمول دائماً. عند تشغيلها، سيتم تشغيل تنبيهات الجلوكوز المنخفض وانخفاض الجلوكوز خارج النطاق على أقصى درجة للصوت على جهازك المحمول. لا يمكنك تغيير مستوى الصوت لإعداد التجاوز هذا. يتيح لك ذلك الاستمرار في تلقي تنبيهات الجلوكوز المنخفض وانخفاض الجلوكوز خارج النطاق على جهازك المحمول، إن كان جهازك المحمول في الوضع الصامت، أو وضع عدم الإزعاج. يجب عليك السماح بذلك في إعدادات جهازك المحمول.


8

الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS


1. اضغط على الزر لتفعيل التجاوز.

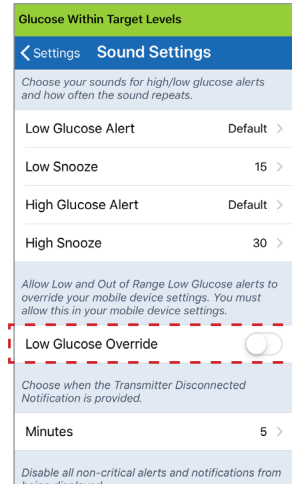

2. اضغط على Settings.

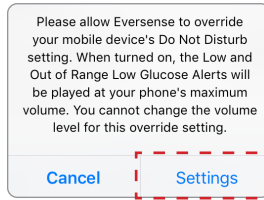


3. اضغط على Allow.

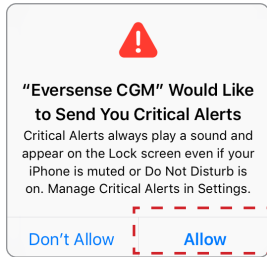

4. يمكن الآن تشغيل مفتاح Low Glucose Override.

سيُعلمك النظام الآن بتنبيهات الجلوكوز المنخفض وانخفاض الجلوكوز خارج النطاق بأعلى مستوى للصوت، حتى وإن كان جهاز Apple الخاص بك في وضع الصامت/الاهتزاز، أو وضع عدم الإزعاج.

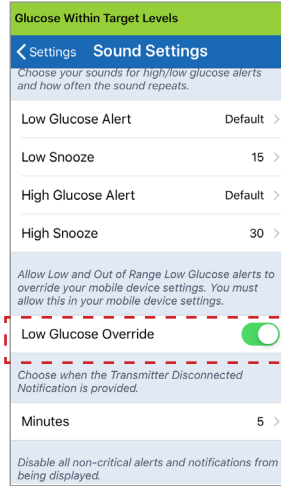




ملاحظة: تعمل هذه الميزة بشكل مشابه للتطبيقات المزودة بميزة "المنبه"، والتي تُصدر صوتًا دائمًا بغض النظر عن إعدادات الصوت بهاتفك.

Please allow Eversense to override your mobile device's Do Not Disturb setting. When turned on, the Low and Out of Range Low Glucose Alerts will be played at your phone's maximum volume. You cannot change the volume level for this override setting.

Cancel

Settings


ملاحظة: إن ضغطت على **Don't Allow** في الخطوة 3، فلن يمكنك تفعيل إعداد **Low Glucose Override**. لتشغيل هذا الإعداد في وقت آخر، عند الضغط على **Settings** من الخطوة 2، سيتم عرض إعدادات Eversense في صفحة إعدادات جهازك المحمول. اضغط على **Notifications > Allow Critical Alerts**. ثم يمكنك تشغيل مفتاح **Low Glucose Override** في تطبيق Eversense App.

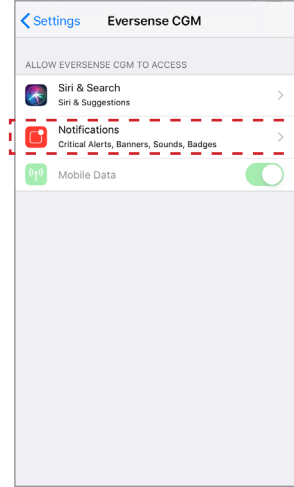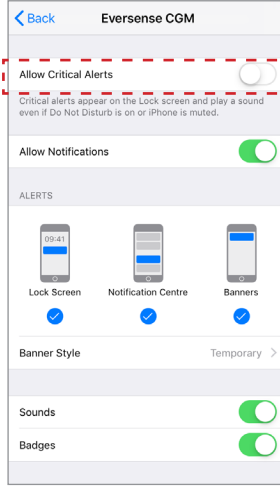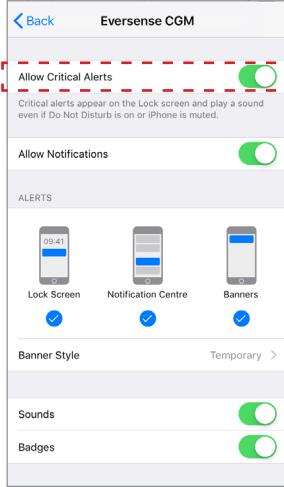


الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android

بالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 6 والإصدارات الأحدث:


1. اضغط على الزر لتنفيذ التجاوز.

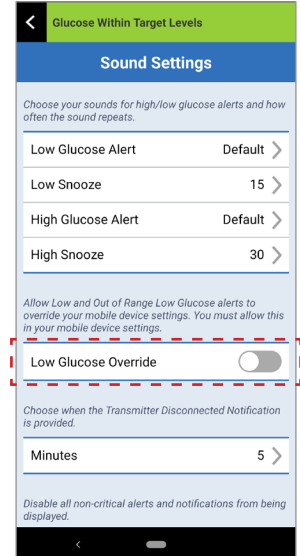


2. اضغط على Settings.

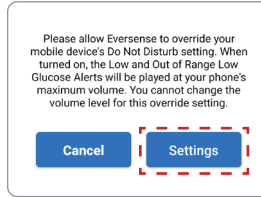


3. اضغط على Eversense من صفحة .Do Not Disturb access

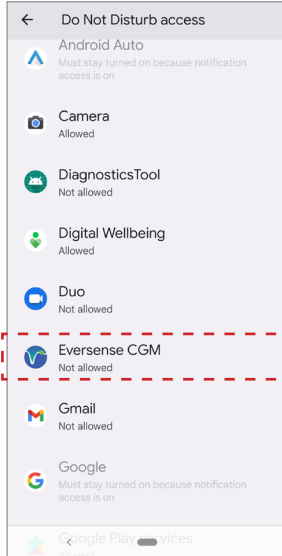

5. اضغط على الزر الموجود بجوار Eversense للسماح لـ Eversense بتجاوز إعدادات Do Not Disturb.


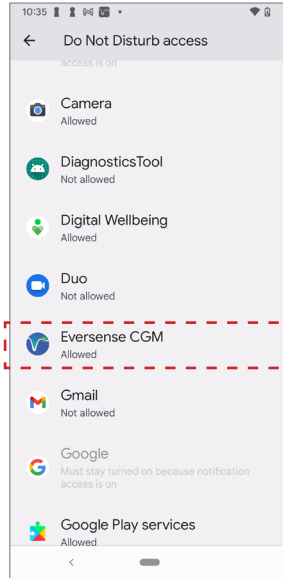


4. اضغط على Allow.

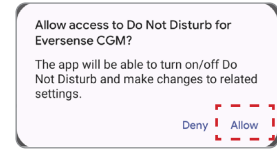


6. العودة إلى تطبيق Eversense CGM للجهاز المحمول.

7. اضغط على مفتاح Low Glucose Override، لإصدار تنبيهات "الجلوكوز المنخفض وانخفاض الجلوكوز خارج النطاق" بأعلى مستوى صوت حتى في حالة تشغيل الوضع الصامت أو وضع الاهتزاز أو وضع عدم الإزعاج بجهازك.

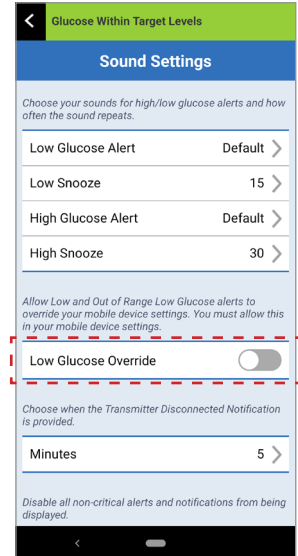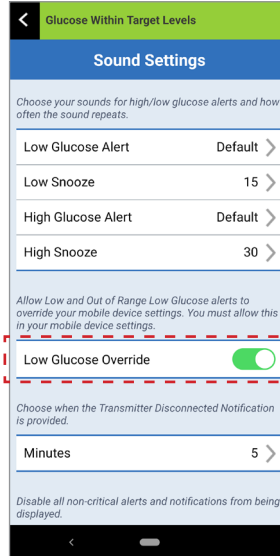


ملاحظة: تعمل هذه الميزة بشكل مشابه للتطبيقات المزودة بميزة "المنبه"، والتي تُصدر صوتاً دائماً بغض النظر عن إعدادات الصوت بهاتفك.

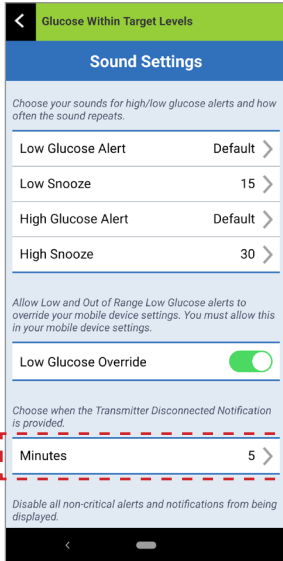

إعدادات فصل جهاز الإرسال Transmitter Disconnect

قد ينقطع اتصال Bluetooth لمرات بين جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول. قد يكون سبب ذلك أن الأجهزة خارج النطاق، أو أن بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة، أو أن ميزة Bluetooth غير مفعلة في إعدادات جهازك المحمول. ويمكنك تخصيص المدة التي يُعلمك فيها النظام قبل انقطاع الاتصال. ويمكنك ضبط الوقت المخصص بعد فقد الاتصال ليتراوح بين 5 إلى 30 دقيقة. عندما لا يتوفر اتصال بين جهاز الإرسال الذكي والتطبيق، سنتلقى فقط التنبيهات الاهتزازية من جهاز الإرسال الذكي. انظر القسم التالي فيما يخص وضع عدم الإزعاج.

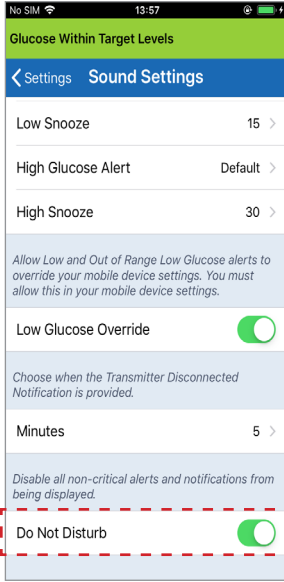

كما تتيح لك شاشة **SOUND SETTINGS** إمكانية تمكين وضع عدم الإزعاج وتعطيله.

• **Do Not Disturb**. يجعل التطبيق وجهاز الإرسال الذكي في وضع عدم الإزعاج "Do Not Disturb".

• **OFF** – كل الإشعارات - التنبيهات والإشعارات - بغض النظر عن طبيعتها الحرجة سيقدمها جهاز الإرسال الذكي والتطبيق.

• **ON** – سيتم تقديم التنبيهات الحرجة فقط بواسطة التطبيق والذنبذة على الجسم من جهاز الإرسال الذكي.

ملاحظة: عندما تقوم بتمكين وضع عدم الإزعاج في جهازك المحمول، لن تتلقى أية تنبيهات أو إشعارات من تطبيق Eversense App. ستظهر أيقونة DND على الشاشة الرئيسية. للاطلاع على قائمة التنبيهات، انظر أوصاف التنبيهات.

وضع عدم الإزعاج في تطبيق Eversense والأجهزة المحمولة

وضع عدم الإزعاج بتطبيق Eversense App قيد التشغيل، وضع عدم الإزعاج للجهاز المحمول قيد التشغيل	وضع عدم الإزعاج بتطبيق Eversense App قيد الإيقاف، وضع عدم الإزعاج للجهاز المحمول قيد التشغيل	وضع عدم الإزعاج بتطبيق Eversense App قيد التشغيل، وضع عدم الإزعاج للجهاز المحمول قيد الإيقاف	وضع عدم الإزعاج بتطبيق Eversense App قيد الإيقاف، وضع عدم الإزعاج للجهاز المحمول قيد الإيقاف	
لا	نعم	لا	نعم	اهتزاز جهاز الإرسال (التنبيهات والإشعارات غير الحرجة)
لا	لا	لا	نعم	شاشة تطبيق Eversense App، صوت الهاتف، واهتزاز الهاتف (التنبيهات والإشعارات غير الحرجة)
نعم	نعم	نعم	نعم	اهتزاز جهاز الإرسال (التنبيهات الحرجة)
لا	لا	نعم	نعم	شاشة تطبيق Eversense App، صوت الهاتف، واهتزاز الهاتف (التنبيهات الحرجة)
لا	لا	نعم	نعم	تذكيرات المعايير (إشعارات الهاتف)
نعم	نعم	نعم	نعم	التنبيه بانخفاض الجلوكوز (تم تفعيل وضع التجاوز)

مهم: يتيح لك بعض أنظمة تشغيل الهواتف تمكين تنبيهات الجلوكوز المنخفض من تجاوز إعدادات الصوت بهاتفك. انظر إعدادات الصوت للاطلاع على المزيد من المعلومات.



ضبط الملف الشخصي المؤقت

أثناء الأنشطة أو الحالات التي تقع خارج روتينك المعتاد، قد ترغب في أن تستخدم بشكل مؤقت إعدادات جلوكوز تختلف عن إعدادات الجلوكوز القياسية التي أدخلتها. تتيح لك شاشة **TEMP PROFILE** إمكانية تغيير إعدادات الجلوكوز المستهدف وتنبيه الجلوكوز مؤقتًا للمدة التي تختارها. عندما تنتهي مدة الملف الشخصي المؤقت، تعود تلقائيًا إعدادات الجلوكوز القياسية التي أدخلتها في **Settings > Glucose**.

2. حدد المدة. يمكنك ضبط الملف الشخصي المؤقت لمدة تصل إلى 36 ساعة بزيادات تبلغ 30 دقيقة.


1. اضغط على **Menu > Settings > Temp Profile** لعرض شاشة **TEMP PROFILE**.

8

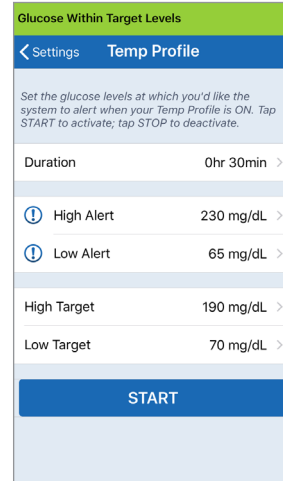
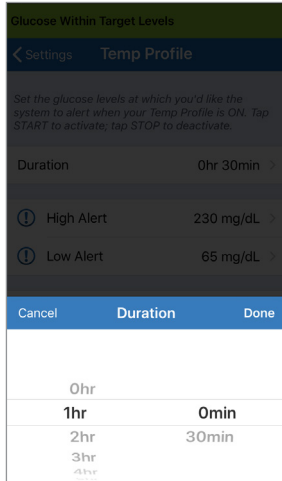


لا يمكن تغيير اختيارات الملف الشخصي المؤقت عندما تبدأ المدة.


أثناء نشاط الملف الشخصي المؤقت، ستظهر أيقونة الملف الشخصي المؤقت على شاشة .MY GLUCOSE

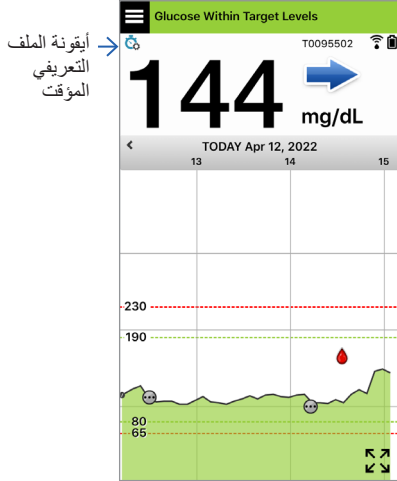


3. قم بتعيين تنبيهات الجلوكوز المنخفض والمرتفع، والمستويات المستهدفة للجلوكوز المنخفض والمرتفع. اضغط على START.

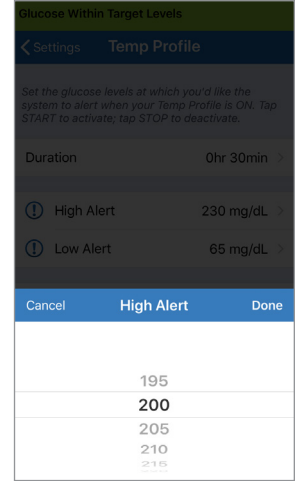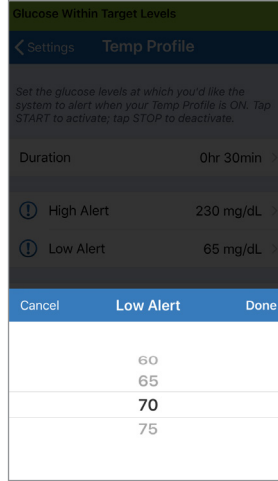

لإنهاء الملف الشخصي المؤقت قبل الوقت الذي حددته،
انتقل إلى **Settings > Temp Profile** واضغط
على **STOP**.

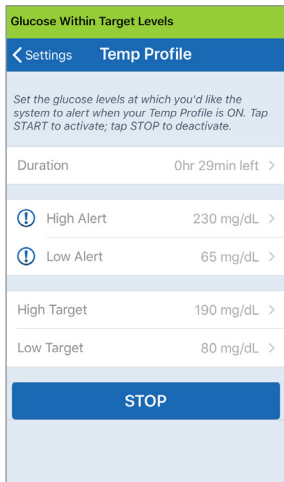

عندما تنتهي مدة الملف الشخصي المؤقت، يعرض
التطبيق إشعارًا وتخفي أيقونة
Temp Profile من شاشة **.MY GLUCOSE**

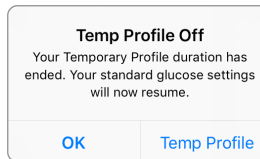

9. أوصاف التنبيه

يصف هذا القسم التنبيهات ورسائل الإشعارات المتعددة التي قد تراها على شاشات تطبيق Eversense App والإجراءات التي قد تحتاج إلى اتخاذها.

يقدم لك نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة تنبيهات وإشعارات مرتبطة بقراءات الجلوكوز وحالة النظام على كل من جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول الخاصين بك. يقدم جهاز الإرسال الذكي تنبيهات مذبذبة على الجسم عند الوصول إلى مستوى تنبيه. يصدر تطبيق الجهاز المحمول صوت تنبيه ويعرض الرسائل على شاشة **MY GLUCOSE**. يصف الجدول أدناه أنماط الذبذبة على جهاز الإرسال الذكي والمؤشرات على تطبيقك.

التنبيهات والإشعارات	نمط ذبذبة جهاز الإرسال الذكي	مؤشرات التنبيه في التطبيق
التنبيهات حيث لا يمكن عرض قيم جلوكوز تتطلب إجراء فوريًا وملائمًا.	3 ذبذبات طويلة	تظهر الرسالة باللون الأصفر
التنبيه بانخفاض الجلوكوز تتطلب إجراء فوريًا وملائمًا.	3 ذبذبات قصيرة × 3	تظهر الرسالة باللون الأصفر
التنبيهات المرتبطة بانخفاض الجلوكوز التنبؤي والجلوكوز المنخفض خارج النطاق تتطلب إجراء فوريًا وملائمًا.	3 ذبذبات قصيرة	تظهر الرسالة باللون الأصفر
التنبيهات المرتبطة بارتفاع الجلوكوز تنبيه ارتفاع الجلوكوز، الارتفاع التنبؤي والارتفاع خارج النطاق. تتطلب إجراء فوريًا وملائمًا.	ذبذبة طويلة ثم ذبذبتان قصيرتان	تظهر الرسالة باللون الأصفر

مؤشرات التنبيه في التطبيق	نمط ذبذبة جهاز الإرسال الذكي	التنبيهات والإشعارات
تظهر الرسالة باللون الأصفر	ذبذبة قصيرة واحدة	التنبيهات المرتبطة بالمشكلات الأقل أهمية تتطلب بعض الإجراءات لكنها قد لا تكون حرجة بالقدر نفسه بطبيعتها. انظر القسم التالي للاطلاع على أمثلة.
تظهر الرسالة باللون الأصفر	3 ذبذبات سريعة، ثم 1 ذبذبة طويلة $2 \times$	تنبيه شحن جهاز الإرسال الذكي بطارية جهاز الإرسال الذكي بشحن منخفض ويجب شحنها.
تظهر الرسالة باللون الأزرق	ذبذبة قصيرة واحدة	الإشعارات تتطلب بعض الإجراءات لكنها ليست حرجة بطبيعتها. انظر القسم التالي للاطلاع على أمثلة.

Alert History

تعرض شاشة **ALERT HISTORY** التنبيهات والإشعارات التي تلقيتها.


تُستخدم الرموز التالية لتوضيح مستوى خطورة الرسائل.

- التنبيهات 
- الإشعارات 
- التنبيهات ذات الصلة بمستويات الجلوكوز 
- تنبيهات البطارية 

ملاحظة: عندما تتلقى تنبيهين أو أكثر لم يتم الاطلاع عليهما، سيعرض التطبيق خيار **Dismiss All**. يمكن أن يحدث هذا عندما يكون جهازك المحمول خارج نطاق جهاز الإرسال الذكي الخاص بك ثم يعيد المزامنة. يمكنك مراجعة كل تنبيه في **Alert History**.

1. اضغط على **Menu > Alert History**.

- ستعرض شاشة **ALERT HISTORY** كل التنبيهات والإشعارات لذلك اليوم.
- اضغط على أي رسالة لتحصل على المزيد من المعلومات.

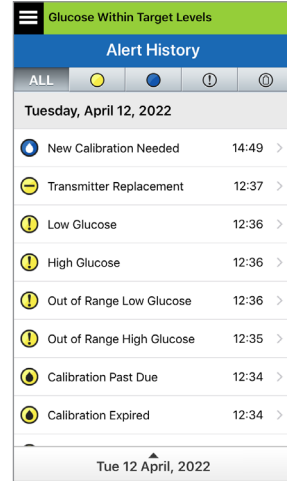

أمثلة على الكل (ALL)

2. يمكنك أن تختار إدراج رسائل معينة فقط (تنبيهات وإشعارات وما إلى ذلك) للاطلاع عليها عن طريق الضغط على رموز التنبيه المحددة.

- اضغط على **ALL**، ثم اضغط على الأيقونات الموجودة أعلى الشاشة لتحديد أنواع التنبيهات التي تريد عرضها فقط.
- اضغط على **Menu** عندما تنتهي.




أمثلة على التنبيهات فقط

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها

يسرد الجدول التالي التنبيهات والإشعارات التي قد تتلقاها على تطبيق Eversense App.


مهم: لا يمكن إيقاف التنبيهات التي عليها علامة * في التطبيق أو جهاز الإرسال الذكي باستخدام وضع عدم الإزعاج في إعدادات التطبيق.

التنبيهات

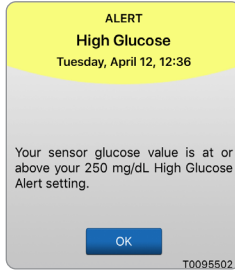

High Glucose

يظهر في الفترة التي تقوم بإدخالها في الإعدادات الصوتية عندما تكون قراءات مستشعر الجلوكوز مساوية لمستوى التنبيه لارتفاع الجلوكوز أو أعلى منه. فترة التكرار الافتراضية هي 30 دقيقة.

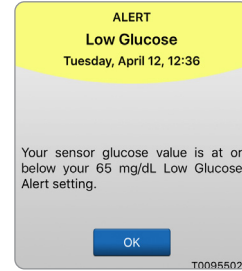

*Low Glucose

يظهر في الفترة التي تقوم بإدخالها في الإعدادات الصوتية عندما تكون قراءات مستشعر الجلوكوز مساوية لمستوى التنبيه لانخفاض الجلوكوز أو أقل منه. فترة التكرار الافتراضية هي 15 دقيقة.



انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

شاشة التطبيق

الوصف

الإجراءات

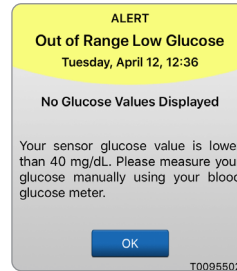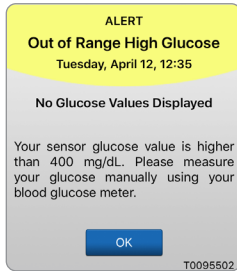

شاشة التنبيهات

***Out of Range High Glucose**

يظهر عندما تكون قيمة الجلوكوز لديك أعلى من 400 mg/dL.

لا يمكن عرض قراءات جلوكوز (تظهر كلمة HI فقط على شاشة MY GLUCOSE).

***Out of Range Low Glucose**

يظهر عندما تكون قراءة الجلوكوز لديك أقل من 40 mg/dL.

لا يمكن عرض قراءات جلوكوز (تظهر كلمة LO فقط على شاشة MY GLUCOSE).



الوصف

قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج.

بمجرد أن تصل قيمة مستشعر الجلوكوز إلى 400 mg/dL أو تقل عنها، ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور على الشاشة.

قم بتأكيد قيمة الجلوكوز لديك باستخدام اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج. بمجرد أن تصل قيمة مستشعر الجلوكوز إلى 40 mg/dL أو تتجاوزها، ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور على الشاشة.

الإجراءات

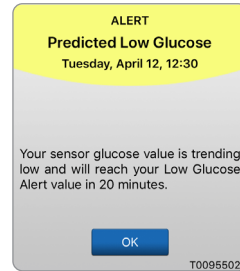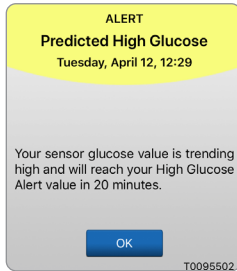

شاشة التطبيق

9

Predicted High Glucose

يظهر كل 60 دقيقة عندما تتجه قيم الجلوكوز لديك للارتفاع وستصل إلى مستوى التنبيه بارتفاع الجلوكوز خلال الوقت الذي أدخلته في الإعدادات.

Predicted Low Glucose



يظهر كل 60 دقيقة عندما تتجه قيم الجلوكوز لديك للانخفاض وستصل إلى مستوى التنبيه بانخفاض الجلوكوز خلال الوقت الذي أدخلته في الإعدادات.

الوصف

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها تختلف عن قيم مستشعر الجلوكوز، أو ما تشير إليه التنبيهات، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها تختلف عن قيم مستشعر الجلوكوز، أو ما تشير إليه التنبيهات، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

الإجراءات

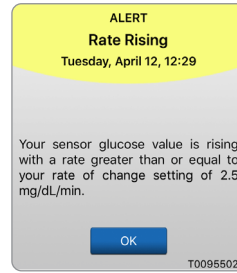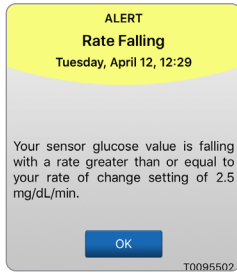

مشاشة التطبيق

Rate Falling

يظهر كل 60 دقيقة عندما تهبط قيم الجلوكوز لديك بمعدل يساوي معدل التغير الذي أدخلته في الإعدادات أو بمعدل أسرع منه.

Rate Rising



يظهر كل 60 دقيقة عندما ترتفع قيمة الجلوكوز لديك بمعدل يساوي معدل التغير الذي أدخلته في الإعدادات أو بمعدل أسرع منه.

الوصف

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها تختلف عن قيم مستشعر الجلوكوز، أو ما تشير إليه التنبيهات، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

انتبه جيداً لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها تختلف عن قيم مستشعر الجلوكوز، أو ما تشير إليه التنبيهات، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال اختبار مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

الإجراءات

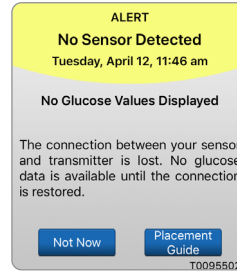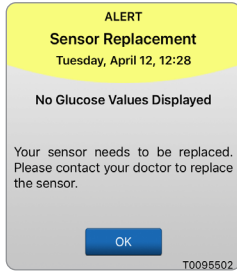

مشاشة التطبيق

9

*Sensor Replacement

يظهر مرة واحدة عندما تكتشف الفحوصات الذاتية للنظام أن المستشعر لم يعد قادرًا على توفير قيم الجلوكوز. ولا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل استبدال المستشعر.

*No Sensor Detected



يظهر عند فقد الاتصال ما بين المستشعر وجهاز الإرسال. لن تتوفر بيانات الجلوكوز حتى استعادة الاتصال.

الوصف

اتصل بمزود الرعاية الصحية لتستبدل مستشعرك.

باستخدام دليل الوضع كمرجع، ضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر حتى يُظهر وجود اتصال.

الإجراءات

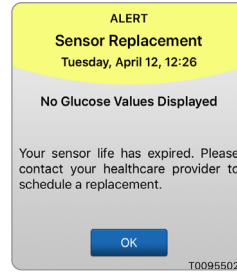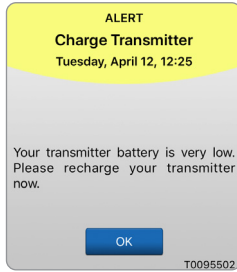

شاشة التطبيق

***Charge Smart Transmitter**

يظهر عندما يكون شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي منخفضًا جدًا وتحتاج إلى شحن بطاريتك سريعًا جدًا.

***Sensor Replacement**



يظهر بمجرد انتهاء العمر الافتراضي للمستشعر. ولا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل استبدال المستشعر.

الوصف

اشحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك في أسرع وقت ممكن.

اتصل بمزود الرعاية الصحية لتستبدل مستشعرك.

الإجراءات

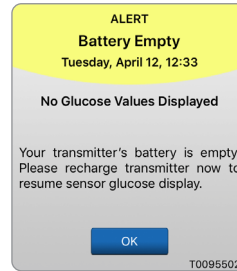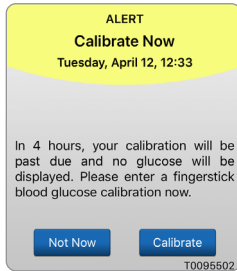

شاشة التطبيق

9

Calibrate Now

يظهر لتنبيهك باقتراب موعد إجراء المعايرة. إذا لم تقم بالمعايرة في غضون 4 ساعات، فلن يتم عرض قيم الجلوكوز.

*Battery Empty

يظهر مرة واحدة عندما تكون بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة وتحتاج إلى شحنها. لا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل شحن جهاز الإرسال الذكي.

الوصف



اضغط على **Calibrate** لإدخال قيمة المعايرة.

قم بشحن جهاز الإرسال الذكي فوراً. أبعد جهاز الإرسال الذكي عن جسمك قبل توصيله بمصدر الطاقة.

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

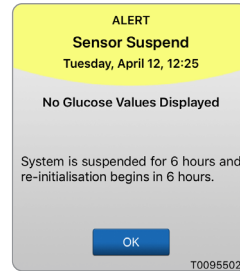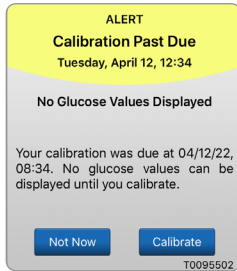

شاشة التطبيق

Calibration Past Due

يظهر عندما يتجاوز النظام لديك موعد المعايرة (16 ساعة خلال مرحلتي المعايرة اليومية، و28 ساعة في مرحلة المعايرة اليومية الواحدة). لا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل إجراء المعايرة.

Sensor Suspend

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام الحاجة إلى إعادة تشغيل مرحلة التهيئة لإجراء معايرات إضافية. لا يمكن عرض قراءات الجلوكوز، حتى إجراء المعايرة الثانية بنجاح.

الوصف



قم بإجراء معايرة باستخدام وخز الإصبع لكي تستأنف عرض قيم الجلوكوز.

تبدأ إعادة تشغيل النظام خلال 6 ساعات. ستظهر قيم الجلوكوز بعد دقائق قليلة من نجاح ثاني معايرة أثناء مرحلة التهيئة.

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

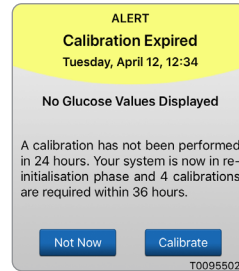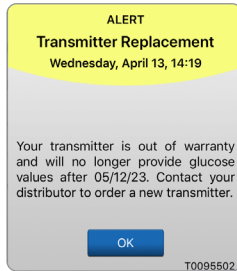

مشاهدة التطبيق

9

*Transmitter End of Life Day 366

يظهر كل 7 أيام عندما يكون جهاز الإرسال لديك قيد الاستخدام لمدة 365 يوماً، ويكون جهاز الإرسال خارج الضمان. بعد 395 يوماً من الاستخدام، لن يقدم جهاز الإرسال مزيداً من قراءات الجلوكوز.

Calibration Expired

يظهر عندما لا يتم إجراء معايرة لمدة 24 ساعة، خلال مرحلتي المعايرة اليومية، أو عند عدم إجراء معايرة خلال 40 ساعة في مرحلة المعايرة اليومية الواحدة. يعود النظام إلى مرحلة التهيئة. لا يتم عرض قراءات الجلوكوز، حتى إجراء المعايرة.

الوصف

اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.



في مرحلة التهيئة، يجب عليك إجراء 4 اختبارات معايرة بوخز الإصبع بفارق زمني يتراوح بين ساعتين و12 ساعة. ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور بعد ثاني اختبار ناجح للمعايرة بوخز الإصبع.

الإجراءات

ملاحظة: في أي من مرحلتي المعايرة اليومية، إذا كان إدخال المعايرة مختلفاً تماماً عن قيمة مستشعر الجلوكوز بالنظام، فستتم مطالبتك بإجراء المعايرة مرة أخرى. إن لم تقم بإجراء المعايرة خلال 16 ساعة، فلن يتم عرض قيم الجلوكوز، وبعد مرور 24 ساعة من عدم إجراء المعايرة، سيعود النظام إلى مرحلة التهيئة.

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

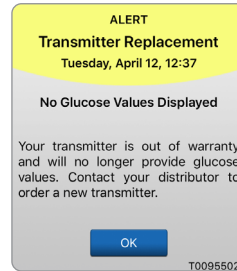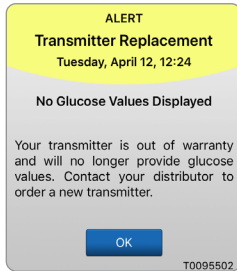

شاشة التطبيق

*Transmitter End of Life Day 396

يظهر عند مرور 395 يوماً من استخدام جهاز الإرسال. ولا يمكن عرض قراءات الجلوكوز، حتى تقوم باستبدال جهاز الإرسال. إن وصل جهاز الإرسال لنهاية عمره الافتراضي، فلا يمكن ربطه بمستشعر.

*Transmitter End of Life Day 395



يظهر بمجرد خروج جهاز الإرسال من الضمان لمدة 30 يوماً. لا يمكن عرض قراءات الجلوكوز بعد تاريخ هذا التنبيه، حتى تقوم باستبدال جهاز الإرسال لديك.

الوصف

اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.

اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.

الإجراءات

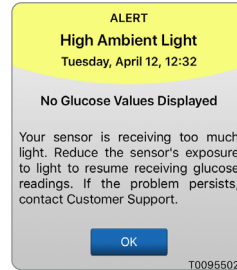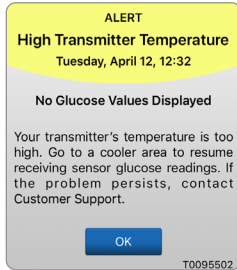

*High Smart Transmitter Temperature

يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي لديك مرتفعة جدًا. لا تظهر قراءات الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي ضمن ظروف التشغيل العادية.

High Ambient Light

يظهر كل 60 دقيقة عندما يتلقى مستشعرك الكثير جدًا من الضوء المحيط مما يؤثر على قدرته على التواصل مع جهاز الإرسال الذكي. ولا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل خفض الضوء المحيط.



قم بتخفيض درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي عن طريق الانتقال إلى بيئة أبرد. بمجرد أن تقل درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي عن 42 درجة مئوية (108 درجات فهرنهايت)، سيستأنف عرض قيم الجلوكوز. يمكنك فك جهاز الإرسال الذكي مؤقتًا لتبريده. بمجرد أن يعود جهاز الإرسال الذكي إلى درجة حرارة أقل، احرص على أن تعيد وضعه فوق المستشعر.

قم بتقليل الضوء المحيط عن طريق إجراء واحد أو أكثر مما يلي:

- انتقل إلى منطقة حيث يقل التعرض للضوء.
- ضع شيئًا داكنًا فوق جهاز الإرسال الذكي.
- قم بارتداء جهاز الإرسال الذكي تحت الملابس.

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

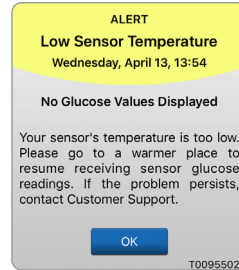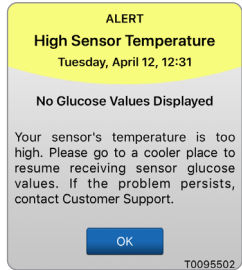

مشاشة التطبيق

*High Sensor Temperature

يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة المستشعر مرتفعة جداً.

ولا تظهر قراءات الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة المستشعر ضمن ظروف التشغيل العادية.

*Low Sensor Temperature

يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة المستشعر منخفضة جداً.



ولا تظهر قراءات الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة المستشعر ضمن ظروف التشغيل العادية.

الوصف

انتقل إلى بيئة أبرد لنقل درجة حرارة المستشعر. اخلع جهاز الإرسال الذكي مؤقتاً أثناء تبريد درجة حرارة المستشعر لتتراوح بين 26 و40 درجة مئوية (81 إلى 104 درجات فهرنهايت). ثم أعد وضع جهاز الإرسال الذكي لتبدأ في تلقي قيم الجلوكوز مرة أخرى من المستشعر.

انتقل إلى بيئة أكثر دفئاً لترفع درجة حرارة المستشعر. استمر في تشغيل جهاز الإرسال الذكي لكي تبدأ في تلقي قيم الجلوكوز عندما تتراوح درجة حرارة المستشعر بين 26 و40 درجة مئوية (81 إلى 104 درجات فهرنهايت).

الإجراءات

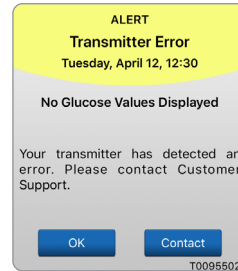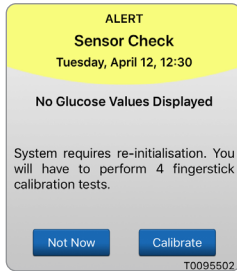

Sensor Check



يظهر مرة واحدة عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام عدم استقرار مع المستشعر مما يتطلب العودة إلى مرحلة تهيئة المعايرة.
لا يمكن عرض قراءات الجلوكوز، حتى إدخال المعايرة الثانية بنجاح.

*Smart Transmitter Error

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام وجود خطأ في جهاز الإرسال الذكي.
لا يتم عرض قراءات الجلوكوز قبل تصحيح الخطأ.

في مرحلة التهيئة، يجب عليك إجراء 4 اختبارات معايرة بوخز الإصبع بفارق زمني يتراوح بين ساعتين و12 ساعة. ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور بعد ثاني اختبار ناجح للمعايرة بوخز الإصبع.

اتبع الخطوات المعروضة في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإعادة ضبط جهاز الإرسال الذكي. إذا كنت لا تستطيع إكمال عملية إعادة الضبط، فاتصل بدعم العملاء.

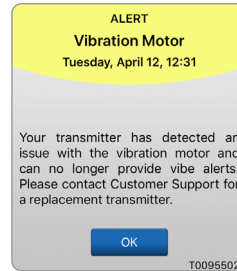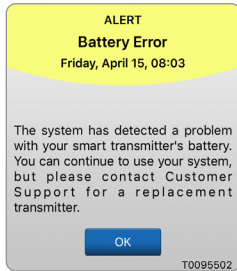

شاشة التطبيق

*Battery Error

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام وجود خطأ في بطارية جهاز الإرسال الذكي. وسيستمر عرض قراءات الجلوكوز، ولكن سيلزم استبدال جهاز الإرسال الذكي.

*Vibration Motor



يظهر كل 60 دقيقة عندما لا يعود محرك الذنبية في جهاز الإرسال الذكي قادراً على توفير تنبيهات مذبذبة على الجسم. سيستمر ظهور قراءات الجلوكوز لمدة 72 ساعة بعد تلقي رسالة التنبيه. بعد 72 ساعة، سنتلقى تنبيه خطأ في جهاز الإرسال Transmitter Error Alert كل 20 دقيقة إلى أن تستبدل جهاز الإرسال الذكي.

الوصف

اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.

اتصل بدعم العملاء لتستبدل جهاز الإرسال الذكي فوراً.

الإجراءات

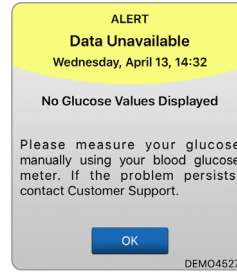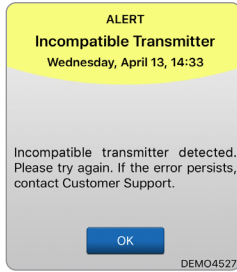

مشاهدة التطبيق

9

***Incompatible Transmitter Detected**

يظهر أثناء عملية الربط، عندما يكتشف النظام أن جهاز الإرسال غير متوافق مع المستشعر.

Data Unavailable

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام وجود خطأ في النظام.
لا يتم عرض قراءات الجلوكوز قبل تصحيح الخطأ.

الوصف



جرب الربط مرة أخرى. إن ظهر الخطأ أثناء المحاولة الثانية، فاتصل بدعم العملاء.

قم بوصل حامل الشحن بالكابل بمقبس الحائط أو منفذ USB. وضع جهاز الإرسال الذكي في الحامل وقم بإزالته. إن استمر الأمر، فاتبع الخطوات المعروضة في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإعادة ضبط جهاز الإرسال الذكي. إذا كنت لا تستطيع إكمال إعادة الضبط، فاتصل بدعم العملاء.

الإجراءات

أوصاف التنبيهات وإجراءاتها (تابع)

التنبيهات

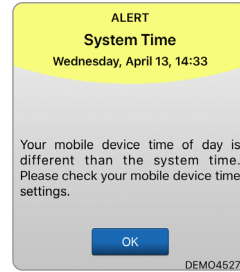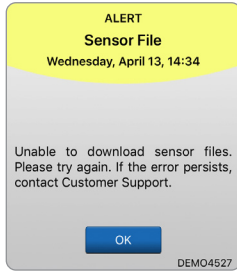

شاشة التطبيق

*Sensor File Error

يظهر عندما يكتشف النظام وجود مشكلة أثناء الربط.

System Time Error



يظهر عندما يكتشف نظامك اختلافاً في الوقت بين ساعة جهازك المحمول وساعة النظام.

الوصف

جرب الربط مرة أخرى. إن ظهر الخطأ أثناء المحاولة الثانية، فاتصل بدعم العملاء.

اضبط ساعة جهازك المحمول على الوقت المحلي الحالي لديك. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.

الإجراءات

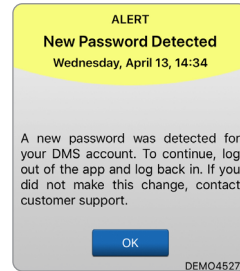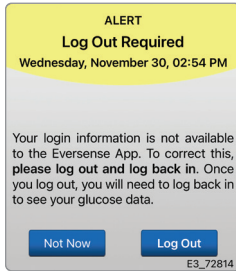

مشاشة التطبيق

9

Log Out Required

يظهر كل 24 ساعة لمستخدمي نظام التشغيل iOS عندما يكتشف النظام أن بيانات اعتماد Eversense غير متوفرة عبر ميزة سلسلة مفاتيح iOS.

New Password Detected


يظهر مرة واحدة عندما يكتشف النظام أن كلمة المرور قد تم تغييرها عبر حساب Eversense DMS الخاص بك.

الوصف

سجل الخروج من تطبيق الهاتف المحمول، وسجل الدخول مجددًا باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين.

سجل الخروج من تطبيق الجهاز المحمول، وسجل الدخول مجددًا باستخدام كلمة المرور الجديدة.

الإجراءات

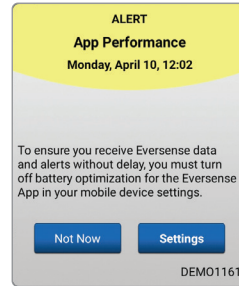

شاشة التطبيق

Calibration In Progress

يظهر عندما تختلف قيمة معايرتك كثيرًا عن قيمة مستشعر الجلوكوز الخاص بك.

App Performance*



يظهر يوميًا بأنظمة التشغيل Android عندما يكتشف النظام وجود أعطال متكررة بالتطبيق، أو حدوث انقطاعات في اتصال Bluetooth نتيجة تضمين تطبيق Eversense بإعدادات تحسين البطارية.

الوصف

لا تقم بإزالة جهاز الإرسال الخاص بك لمدة 15 دقيقة. أعد المعايرة عند الطلب.

اضبط ساعة جهازك المحمول على الوقت المحلي الحالي لديك. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.

الإجراءات

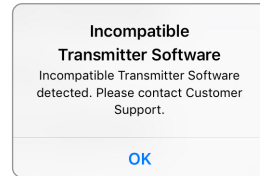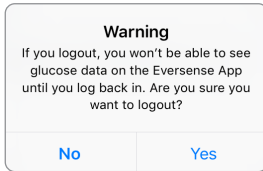

شاشة التطبيق

9

Log Out Warning

يظهر عندما تحاول تسجيل الخروج من تطبيق الجهاز المحمول. إن سجلت الخروج، لا يمكنك عرض بيانات الجلوكوز في تطبيق Eversense للجهاز المحمول.

Incompatible Transmitter Software

يظهر عندما يكون البرنامج الخاص بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك غير متوافق مع إصدار تطبيق Eversense للجهاز المحمول.

الوصف

حافظ على تسجيل الدخول في تطبيق الجهاز المحمول لمتابعة عرض بيانات الجلوكوز لديك. إن سجلت الخروج، فيجب عليك تسجيل الدخول مجددًا باسم المستخدم وكلمة المرور لمتابعة استخدام التطبيق.


اتصل بدعم العملاء.

الإجراءات

Enable Bluetooth and Location Services

The Eversense Mobile App requires location permission to enable Bluetooth scanning and pairing with an Eversense Smart Transmitter. To receive alerts and sensor readings when the app is in use or in the background, allow location services and Bluetooth must remain enabled.

OK

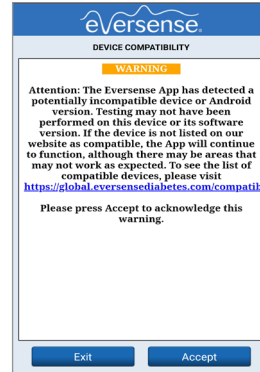

شاشة التطبيق

Enable Bluetooth and Location Services

للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android فقط. توضح أهمية استخدام خدمات الموقع لتمكين اتصال Bluetooth وتلقي التنبيهات.

Incompatible Device/Operating System



يظهر عند استخدام جهاز/نظام تشغيل غير متوافق مع التطبيق.

الوصف

اضغط على OK للإقرار.

للاطلاع على قائمة بالأجهزة/نظم التشغيل المتوافقة، تفضل بزيارة الموقع <https://global.eversenseddiabetes.com>.

الإجراءات

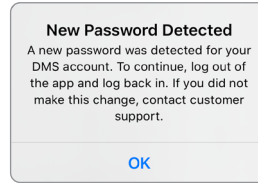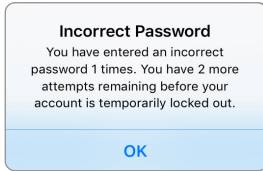

شاشة التطبيق

9

		الوصف
<p>Incorrect Password</p> <p>يظهر عندما يكتشف النظام إدخال واحدة أو أكثر من كلمات المرور غير الصحيحة على التوالي من خلال تطبيق الجهاز المحمول.</p>	<p>New Password Detected</p> <p>يظهر مرة واحدة عندما يكتشف النظام أن كلمة المرور قد تم تغييرها عبر حساب Eversense DMS الخاص بك.</p>	الإجراءات

استخدم كلمة المرور الصحيحة لتسجيل الدخول إلى الجهاز المحمول.

سجل الخروج من تطبيق الجهاز المحمول، وسجل الدخول مجددًا باستخدام كلمة المرور الجديدة.

Delete Account

If you have created an Eversense account, you have the option to delete your account. If you delete your account, it is permanent, and you will no longer have access to your CGM data on the Eversense Mobile App, or in your Eversense DMS account. If you are using the Eversense NOW Mobile App, you will no longer be able to remotely view Eversense CGM data. You cannot use the same email address to create a new account. If you still want to delete your account, please contact your local Eversense customer support team.

OK

Account Locked for 30 Minutes

You have entered an incorrect password 3 times. For security, your account is temporarily locked. Please try again at 14:27.

OK

شاشة التطبيق

Delete Account

يظهر عند الضغط على Delete Account على صفحة تسجيل الدخول.

Account Locked



يظهر بعد إدخال كلمة مرور غير صحيحة لثلاث مرات على التوالي عبر تطبيق الجهاز المحمول.

الوصف

اتصل بدعم العملاء، إن أردت المتابعة.

انتظر لمدة 30 دقائق. سجل الدخول باستخدام كلمة مرور صحيحة أو أعد تعيين كلمة مرورك.

الإجراءات

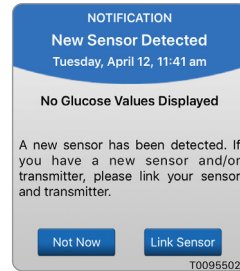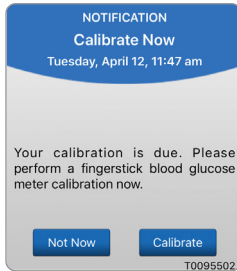

شاشة التطبيق

9

Calibrate Now

يظهر عندما يحين الوقت لإجراء المعايرة عندما يكون النظام في مرحلة التهيئة، أو بعد إدخال معايرة مختلفة بشكل كبير عن مستوى الجلوكوز بالمستشعر.

New Sensor Detected



يظهر عندما يكتشف جهاز الإرسال الذكي مستشعراً جديداً. يجب ربط المستشعر الذي تم إدخاله مع جهاز الإرسال الذكي لبدء الاتصال.

الوصف

قم بإجراء اختبار جلوكوز بالدم بوخز الإصبع وأدخل القراءة لتكون قيمة معايرتك. لا تستخدم موضعاً بديلاً (مثل الساعد) لتحصل على قراءة جلوكوز الدم الخاصة بك.

اضغط على **Link Sensor** لتكتمل عملية الربط وتبدأ مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة. لا تحتاج إلى ارتداء جهاز الإرسال الذكي الخاص بك فوق المستشعر حتى تكتمل مرحلة الإحماء.

الإجراءات

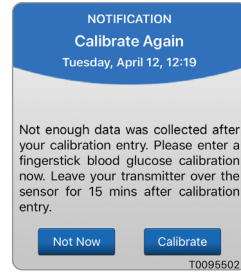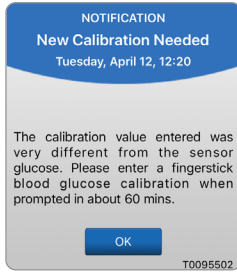

شاشة التطبيق

New Calibration Needed

يظهر إن كانت قيمة المعايرة التي تم إدخالها مختلفة بشكل كبير عن قيمة مستشعر الجلوكوز. بعد حوالي ساعة، ستتلقى الإشعار Calibrate Now.

Calibrate Again


يظهر عندما لا يتم جمع بيانات كافية أثناء المعايرة.

الوصف

أدخل قيمة معايرة جديدة عندما يُطلب منك ذلك.

اضغط على **Calibrate** لإدخال قيمة معايرة جديدة.

الإجراءات

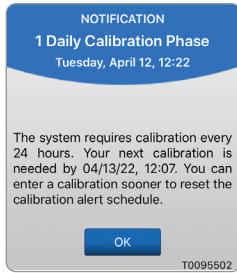

مشاركة التطبيق

9

1 Daily Calibration

يظهر مرة واحدة عندما يتطلب النظام إجراء معايرة لمرة واحدة كل 24 ساعة.

Sensor Replacement



يظهر عند 60 و30 و14 و7 و3 أيام ويوم واحد قبل استكمال المستشعر فترة الارتداء المخصصة له، كتذكير لك لاستبدال المستشعر.

الوصف

أدخل قيمة معايرة جديدة عندما يُطلب منك ذلك.

تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد إخراج مستشعرك واستبداله.

الإجراءات

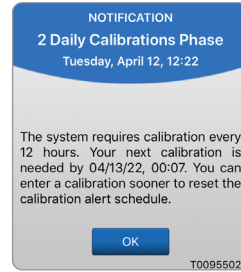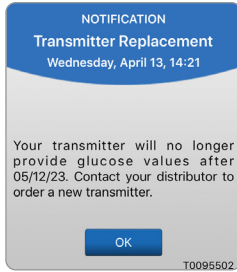

شاشة التنبيه

Transmitter End of Life Day 330

يظهر مرة واحدة قبل انتهاء مدة ضمان جهاز الإرسال الخاص بك بمدة 35 يوماً.

2 Daily Calibrations

يظهر مرة واحدة عندما يتطلب النظام إجراء معايرة مرتين يومياً.

الوصف

اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.

أدخل قيمة معايرة جديدة عندما يُطلب منك ذلك.


الإجراءات


Event Log .10


يصف هذا القسم كيفية مراجعة الأحداث وتسجيلها للمساعدة في تتبع أنماط الجلوكوز بشكل أفضل.

يتيح لك نظام CGM Eversense E3 إمكانية تسجيل الأحداث وتتبعها بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لمستويات الجلوكوز. يمكنك أن تدخل يدويًا الأحداث التي ستظهر على الرسم البياني للاتجاه وفي تقارير الجلوكوز لمساعدتك في التوصل إلى أنماط حالة الجلوكوز لديك.

أنواع الأحداث:

الجلوكوز 

الوجبات 

الأنسولين 


الصحة 

التمارين 

ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى شاشة **ADD EVENT** مباشرةً من شاشة **MY GLUCOSE** بضغط واحدة في أي مكان على منطقة الرسم البياني.

عرض الأحداث

يمكنك مشاهدة الأحداث السابقة التي تم إدخالها من شاشة **EVENT LOG**.

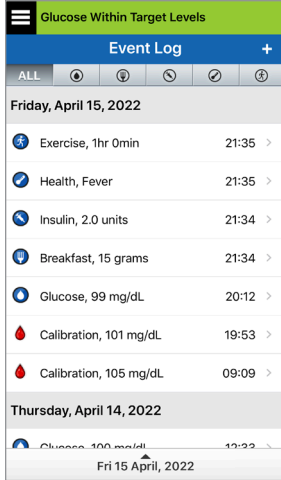

Glucose Within Target Levels	
Event Log +	
ALL	
Friday, April 15, 2022	
Exercise, 1hr 0min	21:35 >
Health, Fever	21:35 >
Insulin, 2.0 units	21:34 >
Breakfast, 15 grams	21:34 >
Glucose, 99 mg/dL	20:12 >
Calibration, 101 mg/dL	19:53 >
Calibration, 105 mg/dL	09:09 >
Thursday, April 14, 2022	
Glucose, 100 mg/dL	13:22 >
Fri 15 April, 2022	

1. اضغط على **Menu > Event Log**.

ستظهر شاشة **EVENT LOG**.

2. سيتم سرد كل الأحداث التي أدخلتها.

يمكنك أيضاً تحديد أنواع أحداث معينة ترغب بمشاهدتها عن طريق الضغط

على نوع حدث محدد.

- اضغط على **ALL**، ثم اضغط على الأيقونات الموجودة أعلى الشاشة لتحديد أنواع الأحداث التي تريد عرضها فقط.



أدخل اختبارات مقياس الجلوكوز بالدم وتتبعها (نتائج الاختبارات بخلاف المعايير).

Glucose Within Target Levels	
Cancel	Glucose Save
Time	Apr 12, 2022 14:13 >
Glucose	100 mg/dL >
Notes	>

Glucose Within Target Levels	
Event Log +	
ALL	
Tuesday, April 12, 2022	
Calibration, 104 mg/dL	11:50 >
Monday, April 11, 2022	
<input type="radio"/>	Glucose
<input type="radio"/>	Meal
<input type="radio"/>	Insulin
<input checked="" type="radio"/>	Health
<input type="radio"/>	Exercise
<input checked="" type="radio"/>	Cancel

1. اضغط على **Event Log > Menu**.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث **+** < **Glucose**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.
اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Glucose** لإدخال القيمة الصحيحة للجلوكوز في الدم.
اضغط على **Done**.

ملاحظة: يمكنك إدخال قيمة جلوكوز بالدم بين 20 و 600 mg/dL. سيتم تحويل الإدخالات الأقل من 20 mg/dL إلى 20 وسيتم تحويل الإدخالات الأكبر من 600 mg/dL إلى 600 لأغراض الحساب والعرض.

5. اضغط على **Save**.

6. في مربع **Confirm Glucose** المنبثق، اضغط على **Submit** لتأكيد حدث الجلوكوز والعودة إلى شاشة **EVENT LOG** أو اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات أو لتعديل المعلومات قبل حفظها.

ملاحظة: أحداث الجلوكوز لا تحل محل قياسات المعايير. سيبقى إدخال قراءات المعايير إلزاميًا.

Confirm Glucose	
Time: Apr 15, 2022 10:42 am	
Value: 100 mg/dL	
Cancel	Submit

Android

Confirm Glucose	
Time: Apr 12, 2022 14:13	
Value: 100 mg/dL	
Cancel	Submit

iOS



أدخل نوع الوجبة والتاريخ والوقت وتعداد الكربوهيدرات.

Glucose Within Target Levels		
Cancel	Meal	Save
Time	Apr 12, 2022 14:14	>
Type	Breakfast	>
Carbs	15 grams	>
Notes		>

1. اضغط على **Menu > Event Log**.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث **+** < **Meals**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.

اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Type** لإدخال نوع الوجبة.

اضغط على **Done**.

5. اضغط على **Carbs** لإدخال العدد الصحيح من الكربوهيدرات.

اضغط على **Done**.

6. اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.

اضغط على **Done**.

7. اضغط على **Save** لحفظ الإدخال والعودة إلى شاشة **EVENT LOG**.

اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات.



أدخل وحدات الأنسولين وفقاً للوقت ونوع الأنسولين.

Glucose Within Target Levels	
Cancel	Insulin
Save	
Time	Apr 12, 2022 14:15 >
Units	2.0 >
Type	Rapid-acting >
Notes	>

1. اضغط على **Menu > Event Log**.

2. أضف حدثاً باستخدام أيقونة الحدث **+** < **Insulin**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.
اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Units** لإدخال العدد الصحيح من الوحدات.
اضغط على **Done**.

ملاحظة: أقصى عدد من وحدات الأنسولين يمكن إدخاله هو 200 وحدة.

5. اضغط على **Type** لإدخال نوع الأنسولين الصحيح.
اضغط على **Done**.

6. اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.
اضغط على **Done**.

7. اضغط على **Save** لحفظ الإدخال والعودة إلى شاشة **EVENT LOG**.
اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات.



أدخل نوع الحالة الصحية وحدثها والتاريخ والوقت.

Glucose Within Target Levels	
Cancel	Health
Save	
Time	Apr 12, 2022 14:16 >
Severity	Medium >
Condition	Fever >
Notes	>

1. اضغط على **Menu > Event Log**.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث **+** < **Health**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.

اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Severity** لاختيار حدة منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة.

اضغط على **Done**.

5. اضغط على **Condition** لإدخال الحالة الصحية.

اضغط على **Done**.

6. اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.

اضغط على **Done**.

7. اضغط على **Save** لحفظ الإدخال والعودة إلى شاشة **EVENT LOG**.

اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات.



Glucose Within Target Levels		
Cancel	Exercise	Save
Time	Apr 12, 2022 14:16	>
Intensity	Medium	>
Duration	1hr 0min	>
Notes		>

1. اضغط على **Menu > Event Log**.

2. أضف حدثًا باستخدام أيقونة الحدث **+** < **Exercise**.

3. اضغط على **Time** لإدخال التاريخ والوقت الصحيحين.

اضغط على **Done**.

4. اضغط على **Intensity** لاختيار شدة منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة.

اضغط على **Done**.

5. اضغط على **Duration** لإدخال المدة.

اضغط على **Done**.

6. اضغط على **Notes** لإدخال أي ملاحظات.

اضغط على **Done**.

7. اضغط على **Save** لحفظ الإدخال والعودة إلى شاشة **EVENT LOG**.

اضغط على **Cancel** للخروج من دون حفظ التغييرات.

Reports .II

يصف هذا القسم تقارير الجلوكوز المختلفة المتاحة لتلخيص حالة الجلوكوز لديك. يمكنك اختيار تواريخ محددة أو تحديد نطاقات زمنية محددة سابقًا.

أنواع التقارير

- الملخص الشكلي الأسبوعي.
- الرسم البياني الدائري للجلوكوز.
- إحصائيات الجلوكوز.


ملاحظة: احرص على ضبط تاريخ الجهاز المحمول ووقته بشكل صحيح. تعتمد دقة الرسوم البيانية والتقارير على صحة التاريخ والوقت.

لعرض تقارير الجلوكوز، اضغط على **Menu > Reports** وتمرر للتنقل عبر التقارير الثلاثة المختلفة. يمكنك أيضًا إرسال كل تقرير عبر البريد الإلكتروني عن طريق الضغط على أيقونة البريد الإلكتروني في الركن العلوي الأيمن.

الملخص الشكلي الأسبوعي

يبين هذا التقرير آخر سبعة أيام من قراءات الجلوكوز لديك ملخصة بهيئة رسم بياني خطي لمدة 24 ساعة للمساعدة في التوصل إلى أنماط أثناء اليوم.

- يمثل **الخط الأزرق** متوسط آخر سبعة أيام من قراءاتك في وحدة زمنية مدتها ساعة.
- تعرض **الأشرطة الحمراء** أعلى وأقل قراءات فعلية في وحدة الساعة الزمنية نفسها.
- تمثل **الخطوط الأفقية الحمراء المنقطه** مستويات تنبيه الجلوكوز المرتفع والمنخفض التي حددتها سابقًا.
- تمثل **الخطوط الأفقية الخضراء المنقطه** مستويات الجلوكوز المستهدفة المرتفعة والمنخفضة التي حددتها سابقًا.

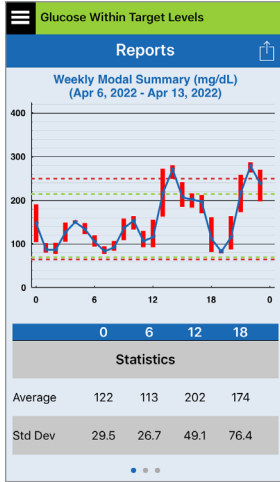

كما يقدم هذا التقرير إحصاءات موجزة (متوسط القراءات، الانحراف المعياري للقراءات)، أداء الجلوكوز المستهدف (النسبة المئوية للقراءات ضمن مستويات الجلوكوز المستهدفة والأعلى منها والأقل منها) وقراءات الجلوكوز المرتفعة والمنخفضة (النسبة المئوية للقراءات التي تقع ضمن مستويات الجلوكوز المستهدفة المنخفضة والمرتفعة). تظهر المعلومات بناءً على فواصل زمنية مدتها 6 ساعات.


إحصائيات الجلوكوز

يوضح هذا التقرير متوسط قراءات الجلوكوز والقراءات المنخفضة والمرتفعة، بالإضافة إلى الانحراف المعياري في نطاق فترات زمنية مدتها 6 ساعات. يمكنك اختيار آخر يوم أو 7 أيام أو 14 يوماً أو 30 يوماً أو 90 يوماً.


Glucose Within Target Levels				
Reports				
1 Day	7 Days	14 Days	30 Days	90 Days
Glucose Statistics (mg/dL) (Apr 12, 2022 - Apr 13, 2022)				
Period	Avg.	Low	High	Std Dev
0 - 6	122	78	190	29.5
6 - 12	113	78	163	26.7
12 - 18	202	93	280	49.4
18 - 0	174	80	286	76.4
ALL	153	78	286	61.7

الرسم البياني الدائري للجلوكوز

يوضح هذا التقرير بتنسيق بياني النسبة المئوية للقراءات الخاصة بك في نطاق المدة الزمنية التي حدثت فيها، وهل هي أقل من مستويات الجلوكوز المستهدفة أم أعلى منها. يمكنك اختيار آخر يوم أو 7 أيام أو 14 يوماً أو 30 يوماً أو 90 يوماً.

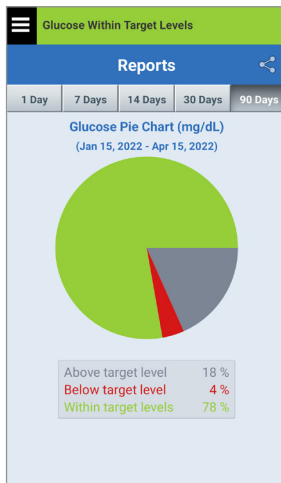

Android

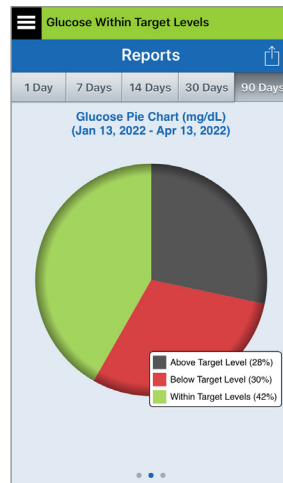

iOS

12. مشاركة البيانات

يمكنك مشاركة البيانات بطرق متعددة باستخدام Eversense.

برنامج Eversense Data Management Software (DMS)

برنامج Eversense DMS هو تطبيق يستند على الإنترنت يتيح للمرضى ومقدمي الرعاية ومختصي الرعاية الصحية عرض وتحليل بيانات الجلوكوز المرسل من جهاز إرسال Eversense E3 الذكي أو تطبيق Eversense CGM للجهاز المحمول.

يتم تقديم هذا البرنامج مجاناً لمستخدمي نظام Eversense E3 CGM. للتعرف على برنامج Eversense DMS، انتقل إلى الموقع <https://global.eversensed diabetes.com>. عندما تقوم بإنشاء حسابك أو تسجيله أثناء تثبيت تطبيق Eversense CGM للجهاز المحمول، يتم إنشاء حساب Eversense DMS تلقائياً من أجلك. يحتوي قسم Eversense NOW على المزيد من المعلومات حول كيفية رؤية بيانات الجلوكوز عن بُعد من نظام Eversense E3 CGM.

مهم: لا يقدم نظام إدارة بيانات EVERSENSE E3 مشورة طبية. ينبغي عدم إجراء تغييرات في خطة علاجك إلا من جانب فريق الرعاية الصحية الخاص بك.

12

Share My Data




نتيح لك ميزة Share My Data في نظام Eversense CGM لتطبيق الهاتف المحمول مزامنة البيانات يدوياً إلى حساب Eversense DMS لديك، ودعوة الأصدقاء والعائلة لعرض بيانات CGM الخاصة بك عن بُعد عبر تطبيق الجهاز المحمول Eversense NOW Mobile، والاتصال بالتطبيقات الصحية الأخرى المتوافقة.



طالما أن لديك اتصالاً بالإنترنت، فإن المزامنة التلقائية تعمل وأنت في حالة تسجيل الدخول إلى التطبيق وتتزامن قراءات الجلوكوز الخاصة بك مع حسابك على Eversense DMS كل 5 دقائق تقريباً. يمكنك إيقاف تشغيل المزامنة التلقائية.

لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية، اضغط على **Sync** في شاشة **SHARE MY DATA**. اضغط على الزر **Auto Sync** لإيقاف التشغيل.

لمزامنة بياناتك يدوياً، اضغط على الزر **START SYNC**. ستتم مزامنة بياناتك لعدد الأيام المحدد كخيارك الافتراضي. يمكنك ضبط أيام المزامنة الافتراضية على يوم واحد أو 3 أيام أو 7 أيام أو 14 يوماً أو 30 يوماً.

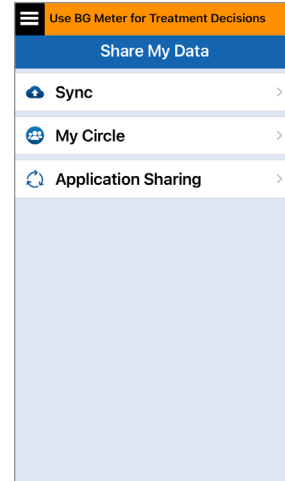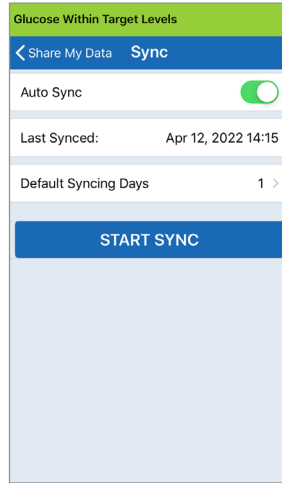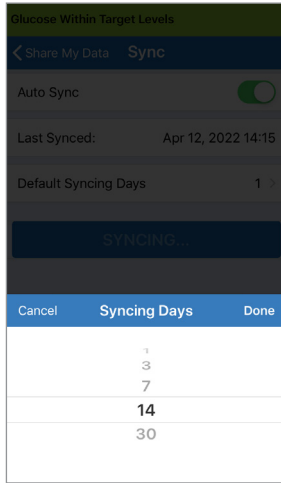


مهم: إذا أوقفت تشغيل المزامنة التلقائية، فلن يتم إرسال بياناتك إلى أي أحد يستخدم تطبيق Eversense NOW لمراقبة بيانات الجلوكوز الخاصة بك عن بُعد ولن يتم تخزين بيانات الجلوكوز التاريخية الخاصة بك في حسابك على DMS.

My Circle






My Circle هي ميزة اختيارية تتيح لك إمكانية تنشيط المراقبة عن بُعد لبيانات CGM Eversense E3 الخاصة بك. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه الميزة، انظر *My Circle - المراقبة عن بُعد*.

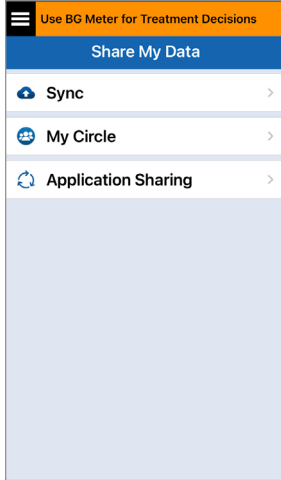

Application Sharing



Application Sharing هي ميزة اختيارية تتيح لك مشاركة بعض بيانات Eversense مع تطبيق صحي آخر متوافق. اضغط على التطبيق وشغل **Share Data**. قد تحتاج أيضًا إلى السماح بالمشاركة عبر التطبيق الصحي.

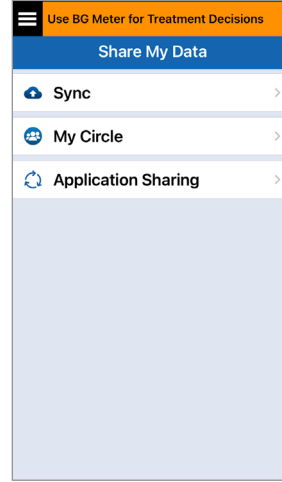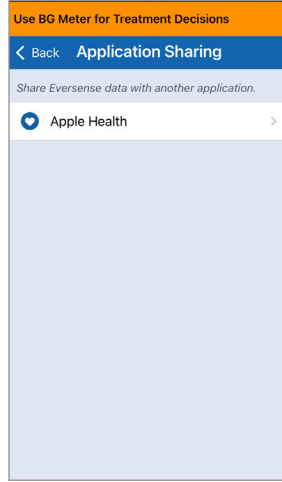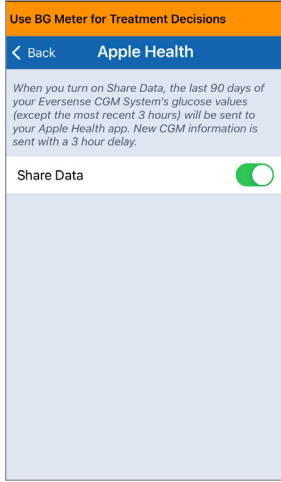

13. معلومات المنتج والمعلومات العامة على التطبيق

يصف هذا القسم المعلومات المتاحة من قسم *About* في *Main Menu*.

يمكنك عرض معلومات المنتج الخاصة بجهاز الإرسال الذكي والمستشعر وتطبيق الجهاز المحمول **Eversense CGM Mobile App**.

يمكنك أن ترى على شاشة **My Sensor** الرقم التسلسلي للمستشعر وتفاصيل الإدخال.

Glucose Within Target Levels	
< About	My Sensor
Linked SN	221984
Insertion Date	04/08/22
Insertion Time	15:59
Detected SN	221984

يمكنك أن تجد في شاشة **My Transmitter** معلومات تتضمن الرقم التسلسلي ومعلومات المعايرة ومستوى شحن البطارية. يمكنك أيضًا التعرف على ميزة الاهتزاز لجهاز الإرسال الذكي.

Glucose Within Target Levels	
< About	My Transmitter
Device Information	▼
Calibration Information	▼
Demonstration	▼

1. اضغط على **About > Menu** ثم اضغط على **My Transmitter** أو **My Sensor** أو **Product Information**.



Glucose Within Target Levels	
< About	
My Transmitter	>
My Sensor	>
My Account	>
Product Information	>
Contact Us	>
Licence Agreement	>
Privacy Statement	>
Help	>

صورة الملف الشخصي


يمكنك تعديل صورة الملف الشخصي في حساب Eversense، والتي سيتم عرضها في تطبيق Eversense Mobile App وفي حساب Eversense DMS الخاص بك.

- انتقل إلى **About > My Account** واضغط على الصورة. يمكنك أيضًا الضغط على الصورة من القائمة الرئيسية.
- اتبع رسائل المطالبة لتحديث الصورة أو حذفها. ويمكنك إما التقاط صورة جديدة أو اختيار صورة موجودة محفوظة على جهازك.
- ستظهر الصورة التي ستختارها على شاشة **Main Menu**.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تغيير صورة الملف الشخصي من حساب Eversense DMS الخاص بك. راجع قسم Eversense DMS للاطلاع على المزيد من المعلومات.

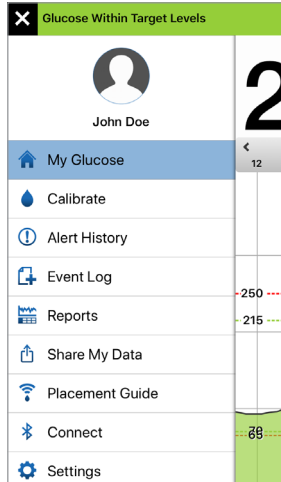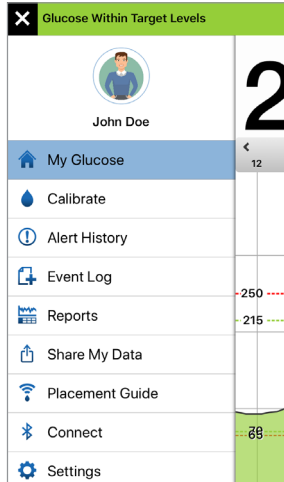

في شاشة **My Account**، يمكنك تعديل صورة الملف الشخصي، وعرض البريد الإلكتروني المستخدم لإنشاء حساب Eversense الخاص بك، وتسجيل الخروج من تطبيق Eversense App.

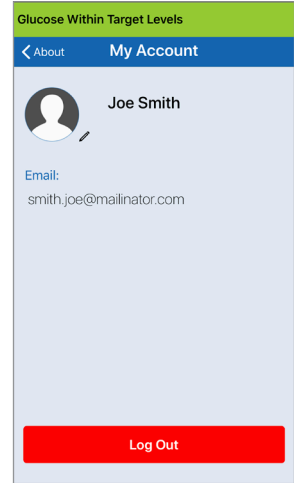


لقراءة اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية، اضغط على أي من الخيارين.



للعثور على موزعك المحلي على موقعنا الإلكتروني، اضغط على **Help**.

يمكنك أيضًا إرسال تعقيبات أو عرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية من قائمة **About**.

• اضغط على **Contact Us** لإرسال بريد إلكتروني إلى فريق دعم العملاء المحلي.

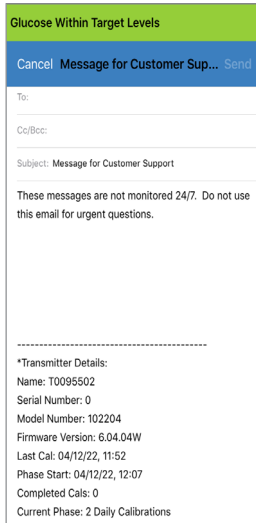

مهم: لا تتم مراقبة هذا البريد الإلكتروني على مدار الساعة. لا تستخدم هذا البريد الإلكتروني في أمور مرتبطة بالصحة أو أي أمور عاجلة.

على شاشة **Product Information**، يمكنك رؤية معلومات عن إصدار برنامج تطبيق الجهاز المحمول وعن شركة Senseonics, Inc. وهي الشركة المنتجة لنظام Eversense E3 CGM.



Warning

If you logout, you won't be able to see glucose data on the Eversense App until you log back in. Are you sure you want to logout?

No

Yes

Glucose Within Target Levels

< About

My Account



Joe Smith

Email:

smith.joe@mailinator.com

Log Out

تسجيل الخروج

لتسجيل الخروج من حسابك

على Eversense، اضغط على

.My Account > Log Out


مهم: إذا سجلت الخروج، فلن تظهر أي بيانات جلوكوز على التطبيق قبل أن تعيد تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين أدخلتهما عندما أعددت حسابك.

14. عرض بيانات Eversense E3 على ساعة Apple Watch


يمكنك عرض لقطة لبيانات Eversense E3 CGM الخاصة بك على ساعة Apple Watch. بمجرد تنزيل تطبيق الجهاز المحمول Eversense CGM Mobile App، وتثبيته على جهازك المحمول، اتبع تعليمات Apple Watch لإضافة التطبيق إلى ساعتك. ساعة Apple Watch هي شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense E3 CGM وينبغي عدم استخدامها بدلاً من شاشة Eversense E3 CGM الرئيسية.

في حالة وجود مشكلات في الأجهزة المحمولة أو الإنترنت اللاسلكي أو اتصال البيانات أو نظام إدارة البيانات Eversense Data Management System (DMS) أو إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بمستخدم مراقبة الجلوكوز المستمرة خارج نطاق الجهاز المحمول، أو في حالة شحن جهاز الإرسال الذكي، قد يؤدي ذلك إلى تأخير في نقل البيانات أو عدم عرضها. إذا شعرت في أي وقت بأعراض انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم أو ارتفاعه أو إذا كانت الأعراض لديك لا تتسق مع قراءات مستشعر الجلوكوز، ينبغي أن تختبر الجلوكوز لديك باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار علاجي.


يمكنك أيضاً الوصول إلى شاشة **MY Glucose** إن قمت بتشغيل الإشعارات من Eversense E3 في إعدادات Apple Watch الخاصة بك. وعندما تتلقى إشعاراً، يمكنك أيضاً الضغط على الرسالة لترى شاشة **MY Glucose**.

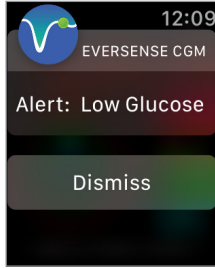


تبين شاشة **My Glucose** الجلوكونز الحالي لديك مع سهم الاتجاه ورسمًا بيانيًا للاتجاه لآخر ثلاث ساعات من بيانات مراقبة الجلوكونز المستمرة لديك.

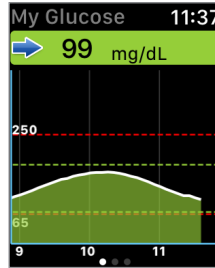


للوصول إلى ميزات التطبيق الإضافية، اضغط على أيقونة **Eversense** في شاشة **HOME** بالساعة لتفتح التطبيق.

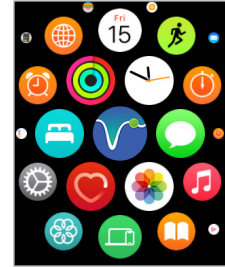


اسحب لليسار إلى الشاشة التالية التي تعرض مستوى الجلوكوز الحالي لديك مع سهم الاتجاه، ووقت المعايرة التالية، ومرحلة المعايرة الحالية للنظام، ومستوى بطارية جهاز الإرسال الذكي.

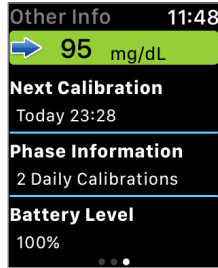

مرر لأعلى لعرض البيانات نفسها كنسب مئوية.

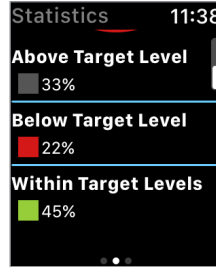

مرر لليسار إلى الشاشة التالية التي تعرض رسمًا بيانيًا دائريًا إجمالي الوقت ضمن نطاقك المستهدف وخارجه لآخر 24 ساعة.


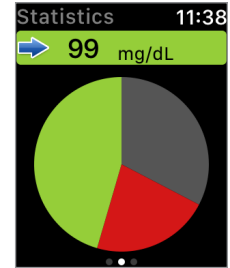


التنبهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch

شاشة Apple Watch عبارة عن شاشة عرض ثانوية لتطبيق الجهاز المحمول Eversense CGM Mobile App. يجب تأكيد أي تنبيهات أو إشعارات يتم تلقيها على ساعة Apple Watch من خلال تطبيق الجهاز المحمول Eversense CGM Mobile App قبل اتخاذ أي إجراء.

فإن تجاهلت التنبيه على ساعتك، فسيختفي التنبيه من شاشة قفل هاتفك. بمجرد فتح تطبيق الجهاز المحمول، سيتم عرض التنبيه مع جميع المعلومات الخاصة به.

يسرد الجدول التالي التنبيهات والإشعارات التي قد تتلقاها على ساعة Apple Watch من خلال تطبيق Eversense App. تتأثر بعض التنبيهات والإشعارات بإعدادات الصوت في تطبيق الجهاز المحمول، ووظيفة Do Not Disturb في تطبيق الجهاز المحمول. انظر *Alert Descriptions and Actions* و *Setting Sounds* للحصول على مزيد من المعلومات.

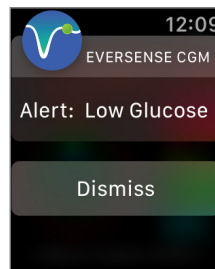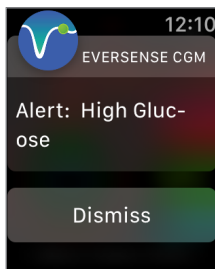

شاشة
Apple Watch

High Glucose

يظهر في الفترة التي تقوم بإدخالها في الإعدادات الصوتية عندما تكون قراءات مستشعر الجلوكوز مساوية لمستوى التنبيه لارتفاع الجلوكوز أو أعلى منه.

Low Glucose

يظهر في الفترة التي تقوم بإدخالها في الإعدادات الصوتية عندما تكون قراءات مستشعر الجلوكوز مساوية لمستوى التنبيه لانخفاض الجلوكوز أو أقل منه.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. انتبه جيدًا لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. انتبه جيدًا لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

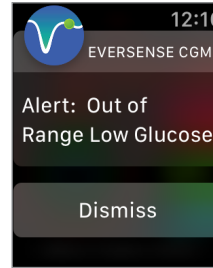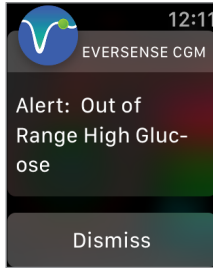

شاشة
Apple Watch

Out of Range High Glucose

يظهر عندما تكون قيمة الجلوكوز لديك أعلى من 400 mg/dL. لا يمكن عرض قراءات جلوكوز.

Out of Range Low Glucose

يظهر عندما تكون قراءة الجلوكوز لديك أقل من 40 mg/dL. لا يمكن عرض قراءات جلوكوز.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. قم بقياس الجلوكوز

لديك يدويًا عن طريق استخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك. تأكد دائمًا من قيمة الجلوكوز لديك باستخدام مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج. بمجرد أن تصل قيمة مستشعر الجلوكوز إلى 400 mg/dL أو تقل عنها، ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور على الشاشة.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول



Eversense CGM Mobile App. قم بقياس الجلوكوز

لديك يدويًا عن طريق استخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك. تأكد دائمًا من قيمة الجلوكوز لديك باستخدام مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار في العلاج. بمجرد أن تصل قيمة مستشعر الجلوكوز إلى 40 mg/dL أو تتجاوزها، ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور على الشاشة.

الإجراءات

التنبهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبهات

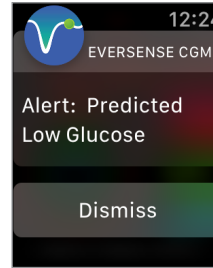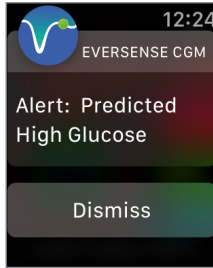

شاشة
Apple Watch

Predicted High Glucose

يظهر كل 60 دقيقة عندما تتجه قيم الجلوكوز لديك للارتفاع وستصل إلى مستوى التنبيه بارتفاع الجلوكوز خلال الوقت الذي أدخلته في الإعدادات.

Predicted Low Glucose

يظهر كل 60 دقيقة عندما تتجه قيم الجلوكوز لديك للانخفاض وستصل إلى مستوى التنبيه بانخفاض الجلوكوز خلال الوقت الذي أدخلته في الإعدادات.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. انتبه جيدًا لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. انتبه جيدًا لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

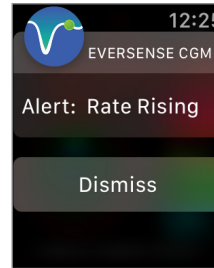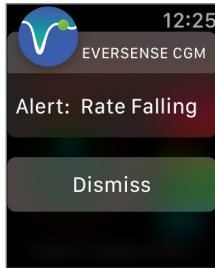

شاشة
Apple Watch

Rate Falling

يظهر كل 60 دقيقة عندما تهبط قيم الجلوكوز لديك بمعدل يساوي معدل التغيير الذي أدخلته في الإعدادات أو بمعدل أسرع منه.

Rate Rising

يظهر كل 60 دقيقة عندما ترتفع قيمة الجلوكوز لديك بمعدل يساوي معدل التغيير الذي أدخلته في الإعدادات أو بمعدل أسرع منه.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. انتبه جيدًا لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. انتبه جيدًا لقيم الجلوكوز والأعراض والاتجاهات. إذا كانت الأعراض لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، فتأكد من قيمة الجلوكوز لديك من خلال مقياس الجلوكوز بالدم قبل اتخاذ قرار العلاج.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

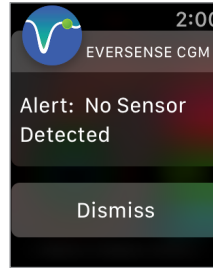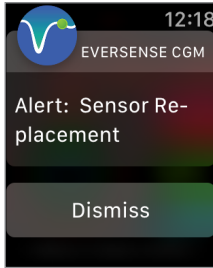

شاشة
Apple Watch

Sensor Replacement

يظهر مرة واحدة عندما تكتشف الفحوصات الذاتية للنظام أن المستشعر لم يعد قادرًا على توفير قيم الجلوكوز.

No Sensor Detected

يظهر عند فقد الاتصال ما بين المستشعر وجهاز الإرسال. لن تتوفر بيانات الجلوكوز حتى استعادة الاتصال.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. اتصل بمزود الرعاية الصحية لتستبدل مستشعرك.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. باستخدام دليل الوضع كمرجع، ضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر حتى يُظهر وجود اتصال.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

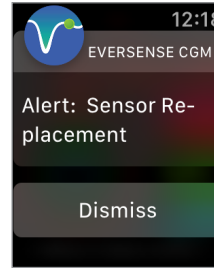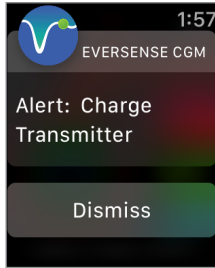

شاشة
Apple Watch

Charge Transmitter

يظهر عندما يكون شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي منخفضاً جداً وتحتاج إلى شحن بطايرتك سريعاً جداً.

Sensor Replacement

يظهر بمجرد انتهاء العمر الافتراضي للمستشعر. ولا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل استبدال المستشعر.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. اشحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك في أسرع وقت ممكن.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول



Eversense CGM Mobile App. اتصل بمزود الرعاية الصحية لتستبدل مستشعرك.

الإجراءات

14

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

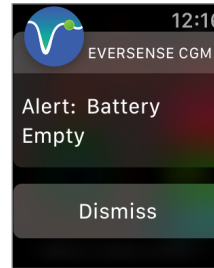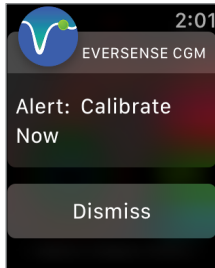

شاشة
Apple Watch

Calibrate Now

يظهر للتنبيهك باقتراب موعد إجراء المعايرة. إذا لم تقم بالمعايرة في غضون 4 ساعات، فلن يتم عرض قيم الجلوكوز.

Battery Empty

يظهر مرة واحدة عندما تكون بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة وتحتاج إلى شحنها. لا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل شحن جهاز الإرسال الذكي.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. اضغط على **Calibrate** على جهازك المحمول لإدخال قيمة المعايرة.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. قم بشحن جهاز الإرسال الذكي فوراً. أبعد جهاز الإرسال الذكي عن جسمك قبل توصيله بمصدر الطاقة.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

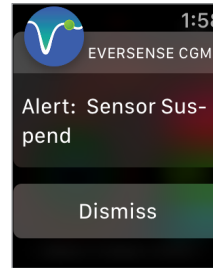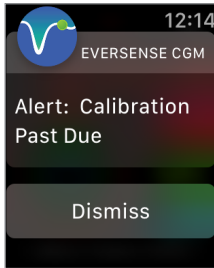

شاشة
Apple Watch

Calibration Past Due

يظهر عندما يتجاوز النظام لديك موعد المعايرة. لا يمكن عرض قراءات جلوكوز، حتى يتم إدخال قيمة المعايرة في تطبيق الجهاز المحمول Eversense CGM Mobile App.

Sensor Suspend

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام الحاجة إلى إعادة تشغيل مرحلة التهيئة لإجراء معايرات إضافية. ستظهر قيم الجلوكوز بعد دقائق قليلة من نجاح ثاني معايرة أثناء مرحلة التهيئة.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. قم بإجراء معايرة

باستخدام وخز الإصبع لكي تستأنف عرض قيم الجلوكوز.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول



Eversense CGM Mobile App. تبدأ إعادة تشغيل

النظام خلال 6 ساعات.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

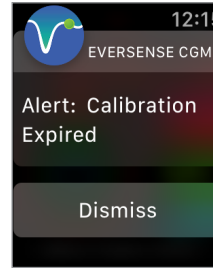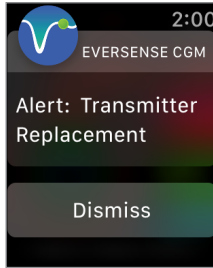

شاشة
Apple Watch

Transmitter End of Life 366

يظهر مرة واحدة عندما يكون جهاز الإرسال لديك قيد الاستخدام لمدة 365 يومًا، ويكون جهاز الإرسال خارج الضمان.

بعد 395 يومًا من الاستخدام، لن يقدم جهاز الإرسال مزيدًا من قراءات الجلوكوز.

Calibration Expired

يظهر عندما لا يتم إجراء معايرة لمدة 24 ساعة. يعود النظام إلى مرحلة التهيئة.

لا يمكن عرض قراءات جلوكوز، حتى يتم إدخال قيمة المعايرة في تطبيق الجهاز المحمول Eversense CGM Mobile App.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. في مرحلة التهيئة، يجب عليك إجراء 4 معايرات بوخز الإصبع بفارق زمني يتراوح بين ساعتين و12 ساعة. ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور بعد ثاني معايرة ناجحة بوخز الإصبع.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

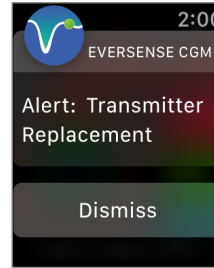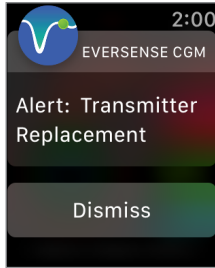

شاشة
Apple Watch

Transmitter End of Life 396

يظهر عند مرور 395 يومًا من استخدام جهاز الإرسال. ولا يمكن عرض قراءات الجلوكوز، حتى تقوم باستبدال جهاز الإرسال

Transmitter End of Life 395

يظهر بمجرد خروج جهاز الإرسال من الضمان لمدة 30 يومًا. لا يمكن عرض قراءات الجلوكوز بعد تاريخ هذا التنبيه، حتى تقوم باستبدال جهاز الإرسال لديك.

الوصف



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول **Eversense CGM Mobile App**. اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول **Eversense CGM Mobile App**. اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

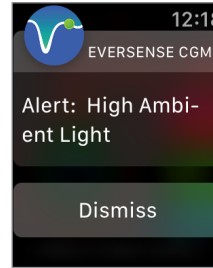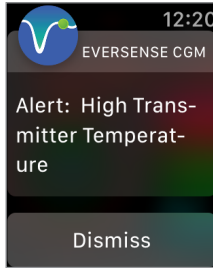

شاشة
Apple Watch

High Transmitter Temperature

يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي لديك مرتفعة جدًا. لا تظهر قراءات الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي ضمن ظروف التشغيل العادية.

High Ambient Light

يظهر كل 60 دقيقة عندما يتلقى المستشعر الكثير جدًا من الضوء المحيط مما يؤثر على قدرته على التواصل مع جهاز الإرسال الذكي. ولا يمكن عرض قراءات الجلوكوز قبل خفض الضوء المحيط.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. قم بتخفيض درجة

حرارة جهاز الإرسال الذكي عن طريق الانتقال إلى بيئة أبرد. بمجرد أن تقل درجة حرارة جهاز الإرسال الذكي عن 42 درجة مئوية (108 درجات فهرنهايت)، سيستأنف عرض قيم الجلوكوز. يمكنك فك جهاز الإرسال الذكي مؤقتًا لتبريده. بمجرد أن يعود جهاز الإرسال الذكي إلى درجة حرارة أقل، احرص على أن تعيد وضعه فوق المستشعر.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. قم بتقليل الضوء المحيط



عن طريق إجراء واحد أو أكثر مما يلي:

- انتقل إلى منطقة حيث يقل التعرض للضوء.
- ضع شيئًا داكنًا فوق جهاز الإرسال الذكي.
- قم بارتداء جهاز الإرسال الذكي تحت الملابس.

الإجراءات

التنبهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبهات

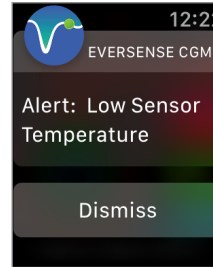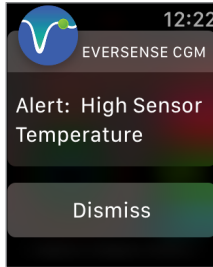

شاشة
Apple Watch

High Sensor Temperature

يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة المستشعر مرتفعة جدًا.

ولا تظهر قراءات الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة المستشعر ضمن ظروف التشغيل العادية.

Low Sensor Temperature

يظهر كل 20 دقيقة عندما تكون درجة حرارة المستشعر منخفضة جدًا.

ولا تظهر قراءات الجلوكوز قبل أن تكون درجة حرارة المستشعر ضمن ظروف التشغيل العادية.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. انتقل إلى بيئة أبرد لنقل درجة حرارة المستشعر. اخلع جهاز الإرسال الذكي مؤقتًا أثناء تبريد درجة حرارة المستشعر لتتراوح بين 26 و40 درجة مئوية (81 إلى 104 درجات فهرنهايت). ثم أعد وضع جهاز الإرسال الذكي لتبدأ في تلقي قيم الجلوكوز مرة أخرى من المستشعر.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. انتقل إلى بيئة أكثر دفئًا لترفع درجة حرارة المستشعر. استمر في تشغيل جهاز الإرسال الذكي لكي تبدأ في تلقي قيم الجلوكوز عندما تتراوح درجة حرارة المستشعر بين 26 و40 درجة مئوية (81 إلى 104 درجات فهرنهايت).

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

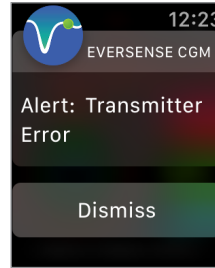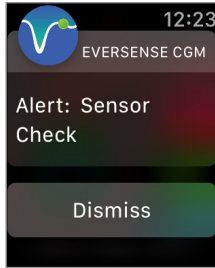

شاشة
Apple Watch

Sensor Check

يظهر مرة واحدة عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام عدم استقرار مع المستشعر مما يتطلب العودة إلى مرحلة تهيئة المعايير.

Smart Transmitter Error

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام وجود خطأ في جهاز الإرسال الذكي. لا يتم عرض قراءات الجلوكوز قبل تصحيح الخطأ.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. في مرحلة التهيئة،

يجب عليك إجراء 4 معايير بوخز الإصبع بفارق زمني يتراوح بين ساعتين و12 ساعة. ستعود قراءات الجلوكوز إلى الظهور بعد ثاني معايرة ناجحة بوخز الإصبع.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول



Eversense CGM Mobile App. اتبع الخطوات

المعروضة في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإعادة ضبط جهاز الإرسال الذكي. إذا كنت لا تستطيع إكمال إعادة الضبط، فاتصل بدعم العملاء.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

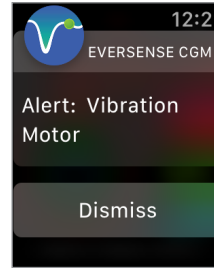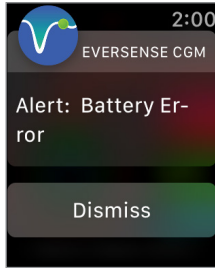

شاشة
Apple Watch

Battery Error

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام وجود خطأ في بطارية جهاز الإرسال الذكي. وسيستمر عرض قراءات الجلوكوز، ولكن سيلزم استبدال جهاز الإرسال الذكي.

Vibration Motor

يظهر كل 60 دقيقة عندما لا يعود محرك الذبذبة في جهاز الإرسال الذكي قادراً على توفير تنبيهات مذبذبة على الجسم. سيستمر ظهور قراءات الجلوكوز لمدة 72 ساعة بعد تلقي رسالة التنبيه. بعد 72 ساعة، ستنتقل تنبيه خطأ في جهاز الإرسال Transmitter Error Alert كل 20 دقيقة إلى أن تستبدل جهاز الإرسال الذكي.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. اتصل بدعم العملاء لتستبدل جهاز الإرسال الذكي فوراً.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

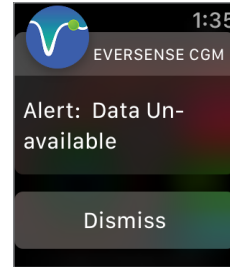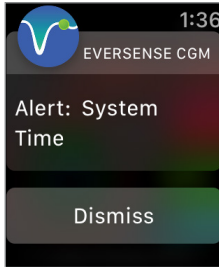

شاشة
Apple Watch

System Time Error

يظهر عندما يكتشف نظامك اختلافاً في الوقت بين ساعة جهازك المحمول وساعة النظام.

Data Unavailable

يظهر عندما تكتشف الفحوصات الداخلية للنظام وجود خطأ في النظام.
لا يتم عرض قراءات الجلوكوز قبل تصحيح الخطأ.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

المحمول على الوقت المحلي الحالي لديك. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

بالكابيل بمقبس الحائط أو منفذ USB. وضع جهاز الإرسال الذكي في الحامل وقم بإزالته. إن استمر الأمر، فاتبع الخطوات المعروضة في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإعادة ضبط جهاز الإرسال الذكي. إذا كنت لا تستطيع إكمال إعادة الضبط، فاتصل بدعم العملاء

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

التنبيهات

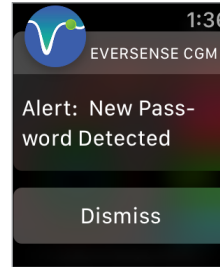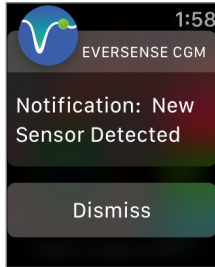

شاشة
Apple Watch

New Sensor Detected

يظهر عندما يكتشف جهاز الإرسال الذكي مستشعراً جديداً. يجب ربط المستشعر الذي تم إدخاله مع جهاز الإرسال الذكي لبدء الاتصال.

New Password Detected

يظهر مرة واحدة عندما يكتشف النظام أن كلمة المرور قد تم تغييرها عبر حساب Eversense DMS الخاص بك.

الوصف



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول **Eversense CGM Mobile App**. وفي تطبيق الجهاز المحمول لديك، اضغط على **Link Sensor** لتكتمل عملية الربط وتبدأ مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة. لا تحتاج إلى ارتداء جهاز الإرسال الذكي الخاص بك فوق المستشعر حتى تكتمل مرحلة الإحماء.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول **Eversense CGM Mobile App**. سجل الخروج من تطبيق الجهاز المحمول، وسجل الدخول مجدداً باستخدام كلمة المرور الجديدة.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

الإشعارات

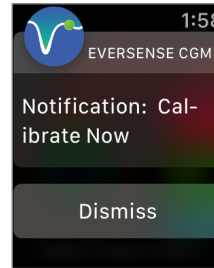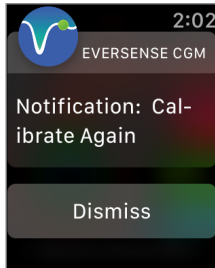

شاشة
Apple Watch

Calibrate Again

يظهر عندما لا يتم جمع بيانات كافية أثناء المعايرة.

Calibrate Now

يظهر عندما يحين الوقت لإجراء المعايرة عندما يكون النظام في مرحلة التهيئة، أو بعد إدخال معايرة مختلفة بشكل كبير عن مستوى الجلوكوز بالمستشعر.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

Eversense CGM Mobile App. اضغط على **Calibrate**

على جهازك المحمول لإدخال قيمة معايرة جديدة.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول



Eversense CGM Mobile App. قم بإجراء اختبار

جلوكوز بالدم بوخز الإصبع وأدخل القراءة لتكون قيمة معايرتك. لا تستخدم موضعًا مبدئيًا (مثل الساعد) لتحصل على قراءة جلوكوز الدم الخاصة بك.

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

الإشعارات

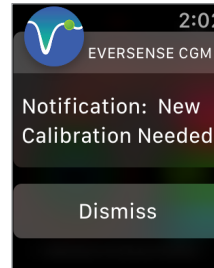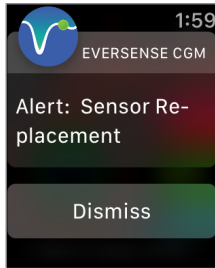

شاشة
Apple Watch

Sensor Replacement

يظهر عند 60 و30 و14 و7 و3 أيام ويوم واحد قبل استكمال المستشعر فترة الارتداء المخصصة له، كتذكير لك لاستبدال المستشعر.

New Calibration Needed

يظهر إن كانت قيمة المعايرة التي تم إدخالها مختلفة بشكل كبير عن قيمة مستشعر الجلوكوز. بعد مرور 60 دقيقة، ستتلقى الإشعار Calibrate Now.

الوصف



قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول **Eversense CGM Mobile App**. تواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد إخراج مستشعرك واستبداله.

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول **Eversense CGM Mobile App**. أدخل قيمة معايرة جديدة عندما يُطلب منك ذلك.

الإجراءات

التنبهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

الإشعارات

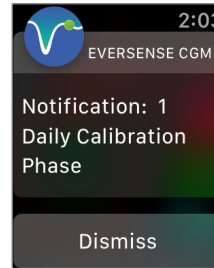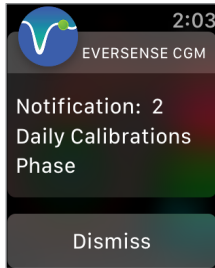

شاشة
Apple Watch

2 Daily Calibrations

يظهر مرة واحدة عندما يتطلب النظام إجراء معايرة مرتين يومياً.

1 Daily Calibration

يظهر مرة واحدة عندما يتطلب النظام إجراء معايرة لمرة واحدة كل 24 ساعة.

الوصف

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

عندما يُطلب منك ذلك. **Eversense CGM Mobile App**. أدخل قيمة معايرة جديدة

قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول

عندما يُطلب منك ذلك. **Eversense CGM Mobile App**. أدخل قيمة معايرة جديدة

الإجراءات

التنبيهات والإشعارات المعروضة على ساعة Apple Watch (تابع)

الإشعارات

	شاشة Apple Watch
<p>Transmitter End of Life Day 330 يظهر مرة واحدة قبل انتهاء مدة ضمان جهاز الإرسال الخاص بك بمدة 35 يومًا.</p>	الوصف
<p>قم بتأكيد التنبيه من خلال تطبيق الجهاز المحمول Eversense CGM Mobile App. اتصل بالموزع من أجل الحصول على جهاز إرسال جديد.</p>	الإجراءات

المراقبة عن بُعد باستخدام نظام Eversense E3 CGM وتطبيق Eversense NOW

يشمل تطبيق Eversense CGM ميزة اختيارية للمراقبة عن بُعد. يتفاعل تطبيق Eversense CGM App مع تطبيق مراقبة الجلوكوز عن بُعد Eversense NOW Remote Glucose Monitoring للسماح للأخزين بالاطلاع على بياناتك.

المخاطر

قد تكون هناك أوقات لا يمكن فيها إرسال بيانات الجلوكوز إلى تطبيق Eversense NOW App. فإذا كان أحد الأعضاء في دائرتك لا يتلقى بيانات الجلوكوز من نظام Eversense E3 CGM، فلن يستطيع مساعدتك في حالة حدوث ارتفاع في قيمة الجلوكوز أو انخفاضها. الشاشة الثانوية والإشعارات في تطبيق الجهاز المحمول Eversense NOW Mobile App ليسا بديلاً عن الشاشة الرئيسية في تطبيق Eversense CGM System Mobile App.

قد لا يكون لدى أعضاء دائرتك دائماً اتصال يدعم نقل البيانات مثل الإنترنت/الواي فاي أو 3G/4G/LTE. إذا لم يكن لديك أو لدى أحد الأعضاء في دائرتك اتصال بالإنترنت، فإن بيانات الجلوكوز الخاصة بك لن تكون متاحة للعرض على شاشة ثانوية. في حالة وجود مشكلات في الأجهزة المحمولة أو الإنترنت اللاسلكي أو اتصال البيانات أو نظام إدارة البيانات Eversense Data Management System (DMS) أو إذا كان جهاز الإرسال الذكي خارج نطاق الجهاز المحمول، أو في حالة شحن جهاز الإرسال الذكي، قد يؤدي ذلك إلى عدم عرض البيانات لأعضاء دائرتك. ينبغي ألا تعتمد على أشخاص يراقبون بيانات الجلوكوز الخاصة بك عن بُعد لمساعدتك في حالة حدث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.

تقدم ميزة المراقبة عن بُعد عرضاً ثانوياً للإشعارات والبيانات لأعضاء دائرتك. فهو ليس نظام مراقبة عن بُعد في الزمن الحقيقي.

الفوائد

نظام Eversense E3 CGM المستخدم مع تطبيق Eversense NOW Remote Monitoring App يمكنه أن يمنح مستخدمي CGM ثقة إضافية، لأنهم يعلمون أن أشخاصاً آخرين يمكنهم أيضاً رؤية بيانات CGM الخاصة بهم.

تحذيرات

- ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق Eversense NOW لاتخاذ قرارات علاجية. استخدم دائماً قيم الجلوكوز بالدم من جهاز قياسك لاتخاذ قرارات العلاج. يمكن أن يؤدي استخدام قيمة مستشعر جلوكوز لاتخاذ قرار علاجي إلى جلوكوز مرتفع أو منخفض بالدم. يُعتبر تطبيق Eversense NOW App شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense E3 CGM. وينبغي عدم استخدامه بدلاً من شاشة Eversense E3 CGM الرئيسية.
- ينبغي ألا تعتمد على أشخاص يراقبون الجلوكوز لديك عن بُعد لإبلاغك بأحداث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.

تنبيهات

- تطبيق Eversense NOW Mobile App لا يحل محل نظام المراقبة حسب توجيه مزود الرعاية الصحية الخاص بك.
- إذا لم تكن ميزة المزامنة التلقائية (الميزة التي تتيح إمكانية إرسال البيانات إلى تطبيق Eversense NOW تلقائياً) في وضع التشغيل، فلا يمكنك مشاركة البيانات مع الموجودين في دانرتك ولن يروا اتجاهات وأحداث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.
- إذا لم يكن لديك ولدي أعضاء دانرتك اتصال بالإنترنت، أو إذا توقف تشغيل الجهاز المحمول بسبب انخفاض شحن البطارية أو نفاد الشحن منها، فلا يمكن عرض بيانات Eversense E3 CGM على تطبيق Eversense NOW App.
- إذا أوقف أعضاء دانرتك الأصوات على جهازهم المحمول، فلن يتلقوا تنبيهات صوتية بشأن بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بك على تطبيق Eversense NOW لديهم.
- إذا ضبطت حالتك على "غير متصل" مع أي من أعضاء دانرتك، فلن يتلقى أيًا من بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بك على تطبيق Eversense NOW لديه. لا تضبط حالتك على "غير متصل" إذا كنت تريد أن يرى أعضاء دانرتك بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة الخاصة بك.
- لا يتصل تطبيق Eversense NOW App مع مستشعر Eversense E3 و/أو جهاز إرسال Eversense E3 الذكي بشكل مباشر.
- لا يستطيع تطبيق Eversense NOW App تغيير الإعدادات في تطبيق Eversense CGM.



تنبيهات (تابع)

- إذا لم يسمح مستخدم تطبيق Eversense NOW بالإشعارات من التطبيق، فلن يتلقى التنبيهات الخاصة بالجلوكوز منك.
- إذا كان جهازك المحمول مضبوطاً على وضع عدم الإزعاج، فلن تسمع أي إشعارات من تطبيق Eversense NOW.

من شاشة **MY CIRCLE** على تطبيق Eversense CGM Mobile App، يمكنك دعوة حتى خمسة أشخاص للاطلاع على بياناتك. عندما تدعو شخصاً لينضم إلى دائرتك، سيتم إرسال دعوة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته. بمجرد قبول الدعوة وتنزيل تطبيق Eversense NOW، يستطيع أعضاء دائرتك الاطلاع على بيانات الجلوكوز وأحداثه وتنبيهاته الأخيرة لديك.

مهم: لن يتمكن أعضاء دائرتك الذين ليس لديهم تطبيق Eversense NOW من رؤية بياناتك.

طالما يكون لدى تطبيق Eversense CGM System App وتطبيق Eversense NOW اتصال بالإنترنت، تجري مزامنة بيانات الجلوكوز لديك مع تطبيق Eversense NOW App كل 5 دقائق تقريباً. قد تستغرق قيم المعايرة وقتاً أطول في المزامنة مع تطبيق Eversense NOW.

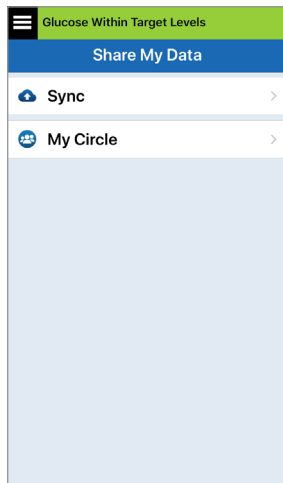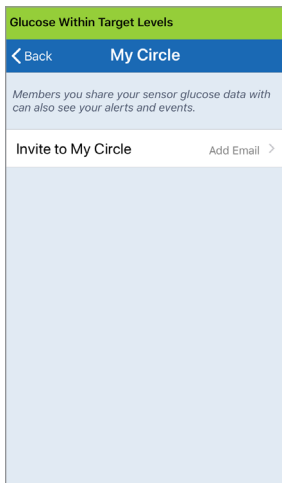


ملاحظة: إذا كنت قد أوقفت تشغيل المزامنة التلقائية، فلن تكون بيانات الجلوكوز الخاصة بك متاحة على تطبيق Eversense NOW للمراقبة عن بُعد.



1. من Main Menu، اضغط على **Share My Data > My Circle** لعرض شاشة **MY CIRCLE**.

2. لدعوة عضو جديد للاطلاع على بيانات الجلوكوز الخاصة بك، اضغط على **Invite to My Circle**.

4. تظهر الشاشة Invitation Sent. اضغط على OK.

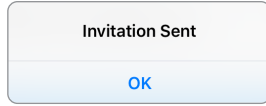


عندما يتم قبول الدعوة، سيظهر اسم العضو في قائمة الأعضاء على شاشة **MY CIRCLE** في تطبيقك.

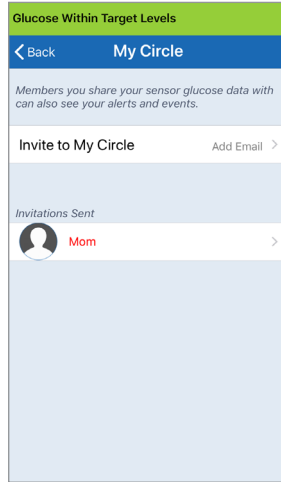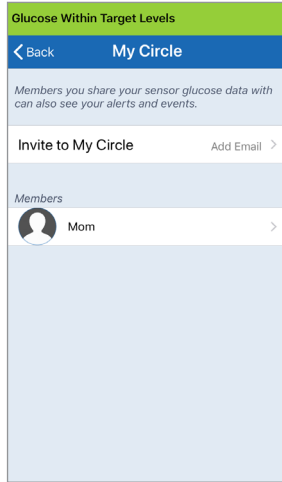

ملاحظة: صور البروفايل لمن يراقبون بيانات الجلوكوز الخاصة بك عن بُعد معدة في حساب DMS من قبل مالك الحساب. لا يمكنك تغيير صور البروفايل لمن دعوتهم إلى دائرتك.

3. أدخل البريد الإلكتروني الخاص بالشخص الذي ترغب في دعوته إلى دائرتك، واضغط على **Send** عندما تنتهي.





ملاحظة: يمكنك الضغط على علامة "+" المجاورة لحقل البريد الإلكتروني لتحديد عنوان بريد إلكتروني من قائمة جهات الاتصال لديك.

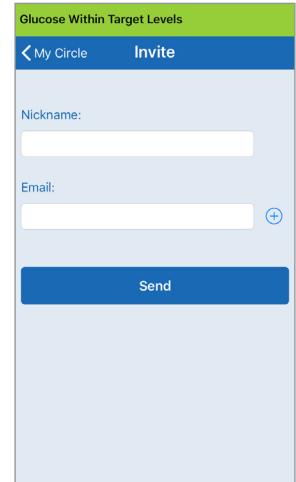

نصيحة: الألقاب اختيارية وتستخدم في مساعدتك على التعامل مع أعضاء دائرتك بسهولة. إذا اخترت ألا تعطي لقبًا لعضو في الدائرة، فسيظهر عنوان بريده الإلكتروني مكان اللقب.

1. لإخراج عضو أو دعوة، اضغط على اسم الشخص في القائمة Members أو القائمة Invitations Sent في الشاشة MY CIRCLE.

2. اضغط على Remove لإخراج العضو من دائرتك. اضغط على Yes عند مطالبتك بذلك.

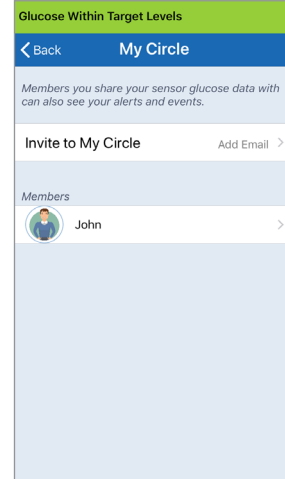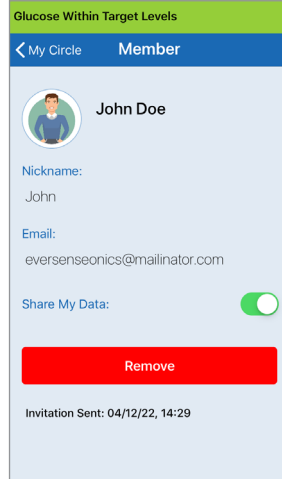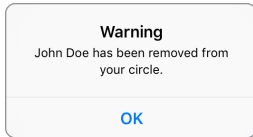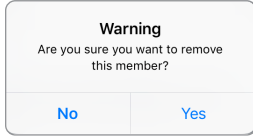


سيتم إخطار العضو الذي تخرجه على تطبيق Eversense NOW لديه إذا كان قد قبل بالفعل.


إيقاف مشاركة البيانات مؤقتًا

قد تكون هناك أوقات ترغب فيها في إيقاف مشاركة البيانات مؤقتًا مع أحد الأعضاء، لكن من دون إخراجها من دائرتك.

2. اضغط على الزر **Share My Data** لتشغيل/ إيقاف مشاركة البيانات مع هذا العضو.

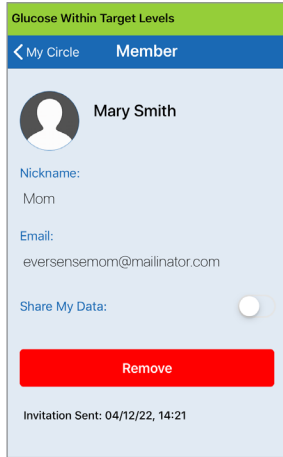

1. اضغط على اسم العضو في القائمة **My Circle** لفتح الشاشة **MEMBER**.

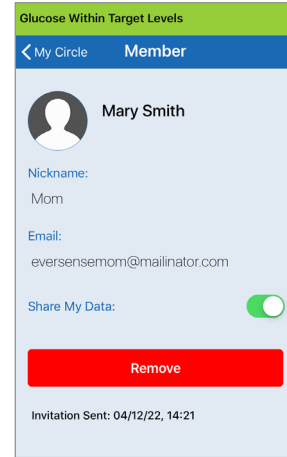

مهم: إذا كنت قد عطلت ميزة **Share My Data** لأحد الأعضاء، فلن يرى ذلك العضو أيًا من بيانات الجلوكوز أو تنبيهاته أو تاريخ أحداته في نظام **Eversense E3 CGM**. وسيرى الأعضاء حالتك باعتبارها غير متصلة **Offline** على تطبيق **Eversense NOW** عندما تقوم بتعطيل ميزة **Share my Data**. يمكن أن يستغرق ظهور التغيير مدة تصل إلى 10 دقائق ليظهر على تطبيق مستخدم **Eversense NOW**.

ملاحظة: يستطيع مستخدم **Eversense NOW** أيضًا أن يخرجك من تطبيقه. يمكن أن يستغرق ظهور هذه التغييرات مدة تصل إلى ساعتين لتظهر على تطبيق **Eversense CGM App** الخاص بك. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول تطبيق **Eversense NOW**، يرجى الرجوع إلى قسم **Eversense NOW**.

16. حول المستشعر

يصف هذا القسم مستشعر Eversense E3 وكيف يُدخله مزود رعايتك الصحية.



مستشعر Eversense E3

مستشعر Eversense E3 عبارة عن مقياس تآلق مصغر، يستخدم كثافة الفلورسنت لقياس الجلوكوز في السائل الخلالي. يتم زرع المستشعر تحت الجلد (تحت البشرة) أعلى الذراع مع عدم ترك أي جزء بارز منه خارج الجلد. ويظل المستشعر في مكانه ويقدم قياسات مراقبة الجلوكوز المستمرة لما يصل إلى 180 يومًا.

المستشعر مغلف بمادة متوافقة بيولوجيًا ويستخدم بوليمر فلورسنت فريدًا لبيين الجلوكوز. يعمل صمام ثنائي باعث للضوء مغروس في المستشعر على استثارة البوليمر فيرسل البوليمر إشارة سريعة بالتغيرات في تركيز الجلوكوز عبر إجراء تغيير في انبعاث الضوء. ثم يتم نقل القياس إلى جهاز الإرسال الذكي. تكتمل القياسات تلقائيًا ولا تحتاج إلى إجراء من المستخدم.

يبلغ قياس المستشعر 3.5 مم × 18.3 مم تقريبًا ويتضمن حلقة من السليكون تحتوي على قدر صغير من أسيتات ديكساميثازون وهو دواء ستيرويدي مضاد للالتهابات. يقلل أسيتات ديكساميثازون من الاستجابات الالتهابية المشابهة جدًا لما يحدث مع الأجهزة الطبية الشائعة مثل الناظمات القلبية.

خطوات الإدخال

سيشرح مزود الرعاية الصحية الخاص بك الخطوات البسيطة والسريعة لإدخال المستشعر وينفذها. وستكون يقظًا تمامًا أثناء عملية الإدخال التي تستغرق ما يقارب 5 دقائق.

موضع الإدخال:

من المهم أن تختار موضعًا مريحًا لك أعلى الذراع لارتداء المستشعر وجهاز الإرسال الذكي لمدة تصل إلى 180 يومًا. يوصى بأن تُدخل المستشعر نحو الجانب الخلفي من أعلى الذراع. يقلل وضعه في هذه المنطقة من احتمال اصطدام المستشعر وجهاز الإرسال الذكي بمدخل الأبواب أو الجدران أو الممرات الضيقة الأخرى. تجنب قدر الإمكان المناطق ذات الجلد المتهدل أو التي فيها ندبات أو وشم أو وحة أو أوعية دموية يمكن قطعها أثناء العملية. يوصى بالتبديل بين الزراعين لتوفير مواضع إدخال لاحقة.

الخطوة 1: تجهيز الموضع – سيتم تنظيف موضع الإدخال وتعقيمه ثم تخديره باستخدام الليدوكاينين.

الخطوة 2: الشق – سيتم عمل شق صغير (أقل من 1 سنتيمتر) في موضع الإدخال.

الخطوة 3: إدخال المستشعر – سيتم عمل جيب تحت الجلد وسيتم إدخال المستشعر في هذا الجيب.

الخطوة 4: إغلاق الموضع – سيتم إغلاق الشق باستخدام ضمادة لاصقة. تُستخدم شرائط Steri Strips™ عادةً لإغلاق الشق.

الخطوة 5: ربط المستشعر وجهاز الإرسال الذكي – اربط المستشعر وجهاز الإرسال الذكي لتبدأ مرحلة الإحماء لمدة 24 ساعة.

ملاحظة: بعد الإدخال، اربط جهاز الإرسال الذكي مع المستشعر ثم اترك موضع الشق ليتعافى لمدة 24 ساعة قبل ارتداء جهاز الإرسال.

يحتاج المستشعر إلى 24 ساعة ليستقر داخل موضع الإدخال، وتُعرف هذه الفترة باسم مرحلة الإحماء. بعد أول 24 ساعة من إدخال المستشعر، ضع جهاز الإرسال الذكي وثبته فوق المستشعر وتأكد من أن لديك اتصالاً (انظر الارتداء اليومي لجهاز الإرسال). يمكنك بعد ذلك إجراء معايرة مرحلة التهيئة باستخدام 4 اختبارات جلوكوز بالدم بوخز الإصبع لتبدأ في الحصول على قراءات الجلوكوز.

خطوات الإخراج

على نفس منوال خطوات الإدخال، سيشرح مزود رعايتك الصحية الخطوات البسيطة والسريعة لإخراج المستشعر، وستكون يقطاً تماماً أثناء عملية الإخراج التي تستمر لمدة 5 دقائق (تقريباً).

الخطوة 1: تجهيز الموقع – سيتم تنظيف موضع المستشعر وتعقيمه ثم تخديره باستخدام الليدوكاينين.

الخطوة 2: الشق – سيتم عمل شق صغير (أقل من 1 سنتيمتر) في موضع المستشعر.

الخطوة 3: إخراج المستشعر – سيتم إخراج المستشعر والتخلص منه.

الخطوة 4: إغلاق الموقع – بمجرد الإخراج، سيتم إغلاق الشق باستخدام Steri Strips™ (قد يتم استخدام غرز على حسب تفضيل المزود).

يصف هذا القسم مشكلات السلامة عند السفر مع جهاز إرسال Eversense E3 الذكي والمستشعر الخاصين بك

عند السفر، من الأمان أن يمر جهاز الإرسال الذكي والمستشعر عبر أمن المطار من دون إزتهما. يمكنك إبلاغ الأمان بأن لديك جهازاً طبيًا مزروعاً.

سينتازم جهاز الإرسال الذكي الخاص بك تلقائيًا مع الوقت والتاريخ الحاليين في هاتفك الذكي عند تغيير المناطق الزمنية.

نظام Eversense E3 CGM آمن للاستخدام على خطوط الطيران التجارية في الولايات المتحدة. جهاز إرسال Eversense E3 الذكي عبارة عن جهاز إلكتروني طبي محمول (M-PED) بمستويات انبعاث موافقة لتوصيات إدارة الطيران الفيدرالية للاستخدام في كل الأوضاع أثناء الطيران. (راجع FAA Advisory, Circular #21-16G بتاريخ 6.22.2011). للاستخدام، قم بتشغيل ميزة Bluetooth في جهازك المحمول بعد أن تضع جهازك المحمول في وضع الطيران. بالنسبة لرحلات الطيران خارج الولايات المتحدة، اتبع لوائح الأمان المحلية لاستخدام الأجهزة الطبية في رحلات الطيران.

18. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا القسم معلومات عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها في نظام Eversense E3 CGM ويتضمن قائمة بالأسئلة المتكررة (FAQ).

جهاز الإرسال الذكي

س: كيف أوقف تشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: اضغط باستمرار على زر الطاقة في جهاز الإرسال الذكي لمدة 5 ثوانٍ. حرر الزر عندما يبدأ جهاز الإرسال الذكي في الذبذبة.

س: كيف أقوم بتشغيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: اضغط باستمرار على زر الطاقة في جهاز الإرسال الذكي لمدة 5 ثوانٍ. حرر الزر عندما يبدأ جهاز الإرسال الذكي في الذبذبة.

س: كيف أضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر بشكل صحيح؟

ج: هناك طريقتان لضمان الوضع الصحيح:

1. عند استخدام الرقعة اللاصقة لتثبيت جهاز الإرسال الذكي، تأكد من أن رمز زر الطاقة ومصباح LED مصطفىان بالتوازي مع ذراعك.

2. استخدم الشاشة **PLACEMENT GUIDE** في

التطبيق لتؤكد الاتصال بين المستشعر وجهاز الإرسال

• اضغط على **Placement Guide**.

• ضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر بحيث يتم تأكيد الاتصال.

ملاحظة: للاطلاع على مزيد من المعلومات حول

قوة الإشارة وموضع جهاز الإرسال، انظر دليل

الوضع – شاشة **Show More Detail** في قسم

ربط المستشعر.

س: جهاز الإرسال الذكي الخاص بي لا يصدر ذبذبة. لماذا؟

ج: إذا لم يصدر جهاز الإرسال الذكي ذبذبة، فجرّب

الخطوات التالية:

• تحقق من اقتران جهاز الإرسال الذكي بجهازك المحمول.

• تحقق من تعطيل وضع **Do Not Disturb**

عن طريق الضغط على **Menu > Settings**

> Sound Settings.

س: لماذا يعرض جهاز الإرسال الذكي الخاص بي مصباح LED بلون برتقالي ثابت؟

ج: اتبع الخطوات أدناه لاستكشاف أخطاء جهاز الإرسال الذكي وإصلاحها:

1. تحقق من إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول.
2. تأكد من أن جهاز الإرسال الذكي مشحون.
3. تحقق من تطبيقك تحسباً لوجود أي تنبيهات أو إشعارات.
4. اخلع جهاز الإرسال الذكي من ذراعك وانتظر لدقائق قليلة. ستظهر رسالة **No Sensor Detected** وينبغي أن يصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبية بتكرار أكبر أثناء بحثه عن مستشعر. إذا لم يتذبذب جهاز الإرسال الذكي أو إذا كان التطبيق لا يعرض رسالة **No Sensor Detected**، فاتصل بدعم العملاء في الولايات المتحدة. خارج الولايات المتحدة، اتصل بموزعك المحلي. أعد وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر لترى ما إذا كان ضوء LED البرتقالي يخفتي وراقب أي إشعارات في التطبيق.

إذا استمر ضوء LED البرتقالي في الظهور، فاتصل بدعم العملاء.

• تحقق من أن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك يحتوي على طاقة بطارية كافية واشحنه عند الضرورة.

إذا استمر جهاز الإرسال الذكي بعدم إصدار ذنبية، فافتصل بدعم العملاء أو الموزع المحلي لديك للمزيد من استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

س: هل يمكنني إزالة الرقعة اللاصقة نفسها واستبدالها أكثر من مرة في اليوم؟

ج: قد تؤدي الإزالة والاستبدال المتكرران إلى التقليل من قوة اللصق.

س: ما الرقم التسلسلي ورقم الطراز لجهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: يمكنك العثور على الرقم التسلسلي والطراز على الجانب الخلفي من جهاز الإرسال الذكي. بمجرد أن تقوم بإقران جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول، يمكنك أيضاً العثور على الرقم التسلسلي والطراز عن طريق الضغط على **Menu > About > My Transmitter**.

س: كيف أخصص اسم جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: اضغط على **Menu > Settings > System > Transmitter Name**. اكتب الاسم الذي ترغب فيه. سيظهر الاسم الجديد لجهاز الإرسال الذكي على شاشة حالة التوصليل لديك.

بطارية جهاز الإرسال الذكي والشحن

س: كم تدوم بطارية جهاز الإرسال الذكي المشحونة بالكامل؟

ج: تدوم بطارية جهاز الإرسال الذكي المشحونة بالكامل عادةً لمدة 24 ساعة إلى 36 ساعة.

س: كم يستغرق شحن جهاز الإرسال الذكي؟

ج: يستغرق الشحن الكامل لجهاز إرسال ذكي 15 دقيقة تقريباً عند توصيله بمنفذ كهرباء في الحائط. قد يستغرق وقتاً أطول إذا كان الشحن عبر منفذ USB في الكمبيوتر أو عندما تكون البطارية فارغة.

س: ما الذي يحدث إذا نفذ شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي الخاص بي تماماً؟

ج: لن تظهر قراءات الجلوكوز. اشحن دائماً على الفور عند نفاذ بطارية جهاز الإرسال الذكي بالكامل.

س: كيف أتأكد من حالة بطارية جهاز الإرسال الذكي؟

ج: هناك ثلاث طرق للتحقق من حالة البطارية:

1. اضغط على **Menu > About > My Transmitter**

قم بالتمرير لأسفل إلى خط مستوى البطارية الذي يبين مقدار شحن البطارية المتبقي.

2. افحص رمز البطارية في الركن العلوي الأيمن على شاشة

MY GLUCOSE. تشير أيقونة البطارية الحمراء إلى أن بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة.

3. ابدأ تشغيل جهاز الإرسال الذكي. اضغط ضغطة قصيرة على زر الطاقة في جهاز الإرسال الذكي. يشير مصباح LED البرتقالي في جهاز الإرسال الذكي إلى انخفاض شحن البطارية. يشير مصباح LED الأخضر إلى أن شحن البطارية لا يقل عن 10%.

س: من صفحة **About > My Transmitter**، يظهر مستوى

البطارية بنسبة 65% ثم ينخفض إلى 35%. لماذا حدث ذلك؟

ج: يختلف معدل تفريغ مستويات شحن البطارية بشكل كبير على حسب الاستخدام، فلن يتم تفريغ شحن طراز البطارية نفسه في جهازين بالمعدل نفسه. هذا هو السبب في أننا نعرض مؤشرات مستوى شحن البطارية على هذه الشاشة بزيادات كبيرة: 100% و65% و35% و10% و0%. يبين اختبارنا أن التنبيه "Low Battery" يظهر بشكل ثابت في النقطة التي لا يزال فيها لدى جهاز الإرسال الذكي حوالي ساعتين من الشحن (عند مستوى المؤشر 10% تقريباً). من المهم شحن بطارتك عندما تتلقى التنبيه "Low Battery".

الاتصال مع جهاز الإرسال الذكي

س: كيف أقوم بإقران جهازي المحمول مع جهاز الإرسال الذكي لأول مرة؟

ج: اتبع الخطوات أدناه لإقران جهازك المحمول مع جهاز الإرسال الذكي. يرجى قراءة دليل المستخدم هذا للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً.

1. ابدأ تشغيل تطبيق Eversense.

2. اضغط على زر طاقة جهاز الإرسال الذكي ثلاث مرات لتدخل إلى الوضع "Discoverable".

3. عندما يومض جهاز الإرسال الذكي باللون الأخضر والبرتقالي، اضغط على معرف جهاز الإرسال الذكي، في شاشة **CONNECT**. سيبدأ التطبيق عندها في عملية البحث.

• يتطابق معرف جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مع الرقم التسلسلي الموجود على الجانب الخلفي من جهاز الإرسال الذكي.

4. عندما يجد التطبيق جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، تظهر شاشة **BLUETOOTH PAIRING REQUEST**

منبثقة.

5. اضغط على **Pair** لتأكيد عملية الإقران.

6. سيعرض التطبيق كلمة **Connected** بجوار

معرف جهاز الإرسال الذكي بمجرد اكتمال الإقران.

س: يبدو أن جهاز الإرسال الذكي وجهازي المحمول غير متصلين.

ج: قد تكون هناك عدة أسباب لعدم وجود اتصال لديك.

• تأكد من أن إعداد Bluetooth في جهازك المحمول يعمل وأن اسم جهاز الإرسال الذكي أو رقمه التسلسلي يظهران على قائمة الأجهزة.

• قد تكون الحالة مؤقتة فقط. اضغط على **Menu > Connect**. إذا كان مكتوباً على اسم جهاز الإرسال الذكي الخاص بك كلمة **Disconnected**، فاضغط على اسم جهاز الإرسال الذكي للاتصال يدوياً.

• قد يكون جهاز الإرسال الذكي الخاص بك والجهاز المحمول خارج النطاق اللاسلكي. انقل جهازك المحمول إلى مكان أقرب من جهاز الإرسال الذكي.

• قد يكون جهاز الإرسال الذكي الخاص بك بحالة إيقاف التشغيل أو بدون طاقة بالبطارية أو يجري شحنه حالياً. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل وظيفة Bluetooth (BLE) في جهاز الإرسال الذكي عن طريق اتباع الخطوات أدناه.

1. أوقف تشغيل جهاز الإرسال الذكي - اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ وانتظر الذبذبة لتتأكد من توقف تشغيله.

2. انتظر ثابنتين واضغط على زر الطاقة ثلاث

مرات لكي تعيد تشغيل وظيفة BLE. (ملاحظة:

عند إعادة تشغيل وظيفة BLE، لا تقم بإزالة/تسيان

الجهاز المقترن عبر إعدادات Bluetooth في

جهازك المحمول.)

3. سيبدأ مصباح LED في الوميض خلال ثانيتين تقريباً ليبيّن أن جهاز الإرسال الذكي يمر عبر تسلسل اختبار ذاتي. سيومض مصباح LED بعدة ألوان. بمجرد اكتمال الاختبار الذاتي، سيصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبية ويستمر ظهور ضوء أخضر أو برتقالي ثابت لمصباح LED.
4. إذا لم يكتمل الاختبار الذاتي، فكرر الخطوات من 1 إلى 3.

5. إذا اكتملت الخطوة 3 بنجاح، يصبح جهاز الإرسال الذكي مستعداً الآن للاستخدام.
6. افصل جهاز الإرسال الذكي من كابل USB وتابع الإقران. بمجرد الإقران، سيكون النظام في مرحلة التهيئة. إذا كنت لا تستطيع إكمال إعادة الضبط، فاتصل بدعم العملاء.

س: هل يستطيع آخرون الاتصال بجهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: يستخدم نظام Eversense E3 CGM اتصال Bluetooth آمناً ولن يسمح لآخرين بالاتصال.

س: ماذا يحدث إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بي غير متصل بجهازي المحمول أو التطبيق؟

ج: سيصدر جهاز الإرسال الذكي ذنبية وسيعرض التطبيق الإشعار "Transmitter Disconnected" كل 5 إلى 30 دقيقة، بناءً على إعدادات الصوت لديك، إلى أن يبدأ تشغيل التطبيق أو إعادة توصيل جهاز الإرسال الذكي. بمجرد إعادة إنشاء الاتصال، سنترامن البيانات التي تم جمعها مع تطبيق الهاتف المحمول.

3. اضغط على زر الطاقة 3 مرات مرة أخرى لتضع جهاز الإرسال الذكي في الوضع القابل للاكتشاف وقم بإقرانه بجهازي المحمول. اضغط على **Menu > Connect** لترى ما إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك متصلاً. إذا لم يكن متصلاً، فاضغط لتحديد جهاز الإرسال الذكي الخاص بك من القائمة.

إذا كانت هذه الخطوات لا تحل المشكلة، فقد تحتاج الانتقال إلى ميزة إعدادات Bluetooth في جهازك المحمول وإلغاء الاقتران أو نسيان جهاز الإرسال الذكي ومن ثم الضغط على زر طاقة جهاز الإرسال الذكي 3 مرات لإعادة الإقران. وإذا ظلت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين جهاز الإرسال الذكي لديك.

س: كيف يمكنني إعادة ضبط جهاز الإرسال الذكي؟

ج: اتبع الخطوات أدناه.

1. ضع جهاز الإرسال الذكي في حامل الشحن وقم بتوصيل كابل USB. قم بتوصيل الكابل في منفذ الكهرباء في الحائط. (يمكنك أيضاً توصيل طرف USB القياسي بالكابل بمنفذ USB في الكمبيوتر مباشرة.)
2. اضغط باستمرار على زر الطاقة (لمدة 14 ثانية تقريباً) في جهاز الإرسال الذكي أثناء التوصيل بـ USB. حرر زر الطاقة.

س: لماذا لا أستطيع توصيل جهازي المحمول مع

جهاز الإرسال الذكي الخاص بي (تظهر عبارة

No Transmitter Connected في شريط

الحالة في التطبيق)؟

ج: قد يفشل جهاز الإرسال الذكي في الاتصال مع جهازك المحمول لأي من الأسباب التالية:

- جهاز الإرسال الذكي قيد الشحن حاليًا.
- تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي.
- شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي نفذ تمامًا.
- تم إيقاف تشغيل Bluetooth في جهازك المحمول.
- لم يتم إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول أو تم "إلغاء إقرانه". يجب أن تعيد إنشاء الإقران.

س: لماذا أرى كلمة **Searching** على شاشة

CONNECT؟

ج: سيواصل التطبيق عرض كلمة **Searching** لأي من الأسباب التالية:

- جهاز الإرسال الذكي قيد الشحن حاليًا.
- تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي.
- شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي نفذ تمامًا.
- تم إيقاف تشغيل Bluetooth في جهازك المحمول.
- لم يتم إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول أو تم "إلغاء إقرانه". يجب أن تعيد إنشاء الإقران.

س: ما هو وضع **"Discoverable"** (الإقران)؟

ج: الوضع القابل للاكتشاف Discoverable هو حالة جهاز الإرسال الذكي التي تتيح إمكانية تحديد موقعه عن طريق جهازك المحمول لإقرانه. انظر بدء التشغيل للاطلاع على المزيد من المعلومات.

س: جهاز الإرسال الذكي الخاص بي ليس مدرجًا على شاشة

CONNECT؟

ج: لن يكون جهاز الإرسال الذكي مدرجًا على شاشة **CONNECT** لأي من الأسباب التالية:

- جهاز الإرسال الذكي قيد الشحن حاليًا عبر USB.
- تم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال الذكي.
- شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي نفذ تمامًا.
- تم إيقاف تشغيل Bluetooth في جهازك المحمول.
- لم يتم إقران جهاز الإرسال الذكي مع جهازك المحمول أو تم "إلغاء إقرانه". يجب أن تعيد إنشاء الإقران.

س: لماذا أرى أجهزة إرسال ذكية أخرى مدرجة على شاشة

CONNECT؟

ج: إذا كان هناك مستخدمون آخرون لنظام Eversense E3 CGM قريبون منك، فقد يجد التطبيق تلك الأجهزة. إلا أن التطبيق لا يتصل إلا مع جهاز الإرسال الذكي الذي تم إقرانه مع جهازك المحمول. لا تحاول إقران جهازك المحمول مع أجهزة إرسال ذكية أخرى لا تخصك.

المعايرة

س: ما الوقت الذي ينبغي إدخاله في شاشة **CALIBRATE** عند إبلاغي بإجراء المعايرة؟

ج: أدخل الوقت الذي أجريت فيه اختبار الجلوكوز بالدم باستخدام جهاز القياس الخاص بك. ويجب عليك إدخال قراءة جلوكوز الدم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار.

س: لماذا رُفضت معايرتي؟

ج: سيرفض النظام المعايرة لأي من الأسباب التالية:

- انخفاض قراءة جلوكوز الدم التي تم إدخالها لأقل من 40 mg/dL.
 - ارتفاع قراءة جلوكوز الدم التي تم إدخالها لأعلى من 400 mg/dL.
- إن كانت هناك حاجة لإجراء معايرة أخرى، فسيطلبك النظام بالقيام بذلك.

س: تلقيت للتو جهاز إرسال ذكي جديد. كيف ألغي اقتران الجهاز القديم وأصل الجهاز الجديد بالنظام الخاص بي؟

ج: في Main Menu، اضغط على **Connect**. اضغط باستمرار على اسم جهاز الإرسال الذكي القديم الخاص بك. اضغط على **OK** لمنع التطبيق من الاتصال تلقائيًا بجهاز الإرسال الذكي القديم. قم بإزالة جهاز الإرسال الذكي القديم من إعدادات Bluetooth لديك. اتبع الخطوات الواردة في دليل المستخدم هذا لإقران جهاز الإرسال الذكي الجديد مع التطبيق وربطه بمستشعرك.

س: لماذا لا أستطيع إجراء المعايرة؟

ج: قد لا تتمكن من إجراء المعايرة لأي من الأسباب التالية:

- عدم جمع ما يكفي من بيانات الجلوكوز من المستشعر، وهو ما قد يستغرق مدة تصل إلى 5 دقائق.
- تتغير قيم الجلوكوز من المستشعر بسرعة، كما يحدث بعد الأكل أو أخذ الأنسولين.
- انخفاض قراءة جلوكوز الدم عن 40 mg/dL.
- ارتفاع قراءة جلوكوز الدم لأعلى من 400 mg/dL.
- تم أخذ قراءة جلوكوز الدم قبل أكثر من 10 دقائق من إدخالها في تطبيق Eversense App.
- اختلاف آخر قيمة من مستشعر الجلوكوز بشكل كبير عن قراءة جلوكوز الدم التي تم إدخالها.
- المعايرة قيد التقدم.
- مرت أقل من ساعة منذ آخر معايرة ناجحة.
- تم فصل جهاز الإرسال الخاص بك.
- جهاز الإرسال غير مرتبط بالمستشعر الخاص بك.
- المستشعر بحاجة للاستبدال.

س: أين يمكنني العثور على تفاصيل مرحلة المعايرة وعدد عمليات المعايرة وتاريخ آخر معايرة ووقتها؟

ج: يمكنك الاطلاع على تفاصيل المعايرة عن طريق الضغط على **Menu > About > My Transmitter**.

س: ما الأنواع المختلفة لمراحل المعايرة؟

ج: يشتمل نظام Eversense E3 CGM على ثلاثة أنواع من مراحل المعايرة: مرحلة التهيئة، مرحلتنا المعايرة اليومية، ومرحلة المعايرة اليومية الواحدة. تبدأ مرحلة التهيئة بعد 24 ساعة من إدخال المستشعر وتحتاج إلى 4 من اختبارات الجلوكوز بالدم بوخز الإصبع للمعايرة. سيعلمك النظام ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء معايرة واحدة أو اثنتين يوميًا.

التنبهات والإشعارات

س: هل يمكنني تغيير نمط التنبيه بالذبذبة في جهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: أنماط ذبذبة جهاز الإرسال الذكي ثابتة ولا يمكن تغييرها. يمكن تغيير الفاصل الزمني للتكرار لبعض التنبيهات من **Settings > Sound Settings**.

س: ما الفرق بين الإشعار والتنبيه؟

ج: الإشعار عبارة عن رسالة غير حرجة ومنخفضة الأولوية (مثل التذكير بالمعايرة).

أما التنبيه فهو رسالة مهمة تحتاج إلى انتباهك وقد تتطلب منك استجابة/اتخاذ إجراء.

س: ما المقصود بالتنبيهات التنبؤية؟

ج: تنبيهك التنبيهات التنبؤية مسبقاً إلى حدث من المرجح حدوثه إذا استمرت الاتجاهات الحالية. تستخدم التنبيهات التنبؤية مستويات التنبيه بانخفاض الجلوكوز وارتفاعه التي تضبطها لتحديد وقت ظهور التنبيهات التنبؤية. يمكنك ضبط التنبيهات لتتذكر 10 دقائق أو 20 أو 30 دقيقة قبل الوقت الذي يتوقع فيه نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة أن تصل إلى مستويات التنبيه التي حددتها. ويُصدر جهاز الإرسال الذكي الخاص بك ذبذبة ويُصدر تطبيقك صوت تنبيه ويعرض رسالة على شاشة **MY GLUCOSE** لإبلاغك بتوقع ارتفاع الجلوكوز أو انخفاضه. إذا كانت الأعراض التي تعاني منها لا تتطابق مع قيمة مستشعر الجلوكوز، أو ما تشير إليه التنبيهات، فيجب إجراء اختبار جلوكوز الدم بوخز الإصبع على الفور قبل اتخاذ قرار العلاج.

س: هل يمكنني زيادة مستوى أصوات التطبيق الصادرة من جهازي المحمول؟

ج: يمكنك زيادة مستوى أصوات التطبيق عن طريق توصيل جهازك المحمول بجهاز خارجي لتكبير الصوت.

س: هل يمكنني تغيير عدد التنبيهات التي أتلقها؟

ج: إذا كنت تشعر أنك تتلقى تنبيهات كثيرة جداً، ينبغي أن تتناقش إعدادات التنبيهات الأنسب لك مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك أولاً. إذا كنت بحاجة إلى تغيير إعدادات تنبيه الجلوكوز الخاصة بك، فاضغط على **Menu > Settings > Glucose**.

س: ما المقصود بتنبيهات معدل التغيير؟

ج: تنبيهك تنبيهات معدل التغيير عندما تهبط مستويات الجلوكوز لديك أو ترتفع بمعدل أسرع من الإعداد الذي أدخلته في **Settings > Glucose**.

س: ما المقصود بتنبهات معدل التغير؟

ج: تنبيهك تنبيهات معدل التغير عندما تهبط مستويات الجلوكوز لديك أو ترتفع بمعدل أسرع من الإعداد الذي أدخلته في **Settings > Glucose**.

س: كيف أسكت صوت تنبيهات الجلوكوز؟

ج: يمكن إسكات صوت تنبيهات الجلوكوز عن طريق تأكيد التنبيه على جهازك المحمول واتخاذ الإجراء الملائم عند الضرورة.

س: لماذا لا أستطيع أن أرى الإشعارات عندما يكون التطبيق في الخلفية؟

ج: راجع تعليمات جهازك المحمول لنقوم بتمكين الإشعارات في الخلفية.

س: ما الذي يحدث للإشعارات إذا كان تطبيقي غير متصل بجهاز الإرسال الذكي الخاص بي؟

ج: إذا كان التطبيق غير متصل بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك، لكنك كنت ترتدي جهاز الإرسال الذكي على المستشعر، فسيتم إرسال التنبيهات التي تم تلقيها أثناء ذلك الوقت إلى التطبيق بمجرد إعادة توصيله ومزامنته مع جهاز الإرسال الذكي.

س: كيف يمكنني تصنيف الإشعارات في شاشة **ALERT HISTORY**؟

ج: تحتوي شاشة **ALERT HISTORY** على فلتر تصنيف بالأعلى. يمكنك التصنيف حسب مستويات الشدة (الأصفر والأزرق) ونوع التنبيه. اضغط على أيقونة فلتر التصنيف المرغوب فيه.

قراءات الجلوكوز

س. لماذا تختلف قراءة المستشعر الخاص بي عن قراءة جهاز قياس الجلوكوز بالدم؟

ج: يقيس نظام Eversense E3 CGM الجلوكوز في السائل الخلالي (ISF) بين خلايا الجسم. قد تتسبب الاختلافات الفسيولوجية بين السائل الخلالي والدم المأخوذ من جهاز القياس بوخز الأصبع في اختلافات قياسات الجلوكوز. وتصبح هذه الاختلافات أكثر وضوحًا أثناء أوقات التغيير السريع في جلوكوز الدم (أي، بعد تناول الطعام، جرعة الأنسولين، أو التدريب)، وعند البعض، خلال الأيام القليلة الأولى بعد الإدخال بسبب الالتهاب الذي قد ينتج عن إجراء الإدخال. في المتوسط، تتأخر مستويات الجلوكوز في السائل الخلالي خلف مستويات الجلوكوز في الدم بفترة دقائق. حتى تكون على دراية بهذه الاختلافات، تأكد من قراءات المستشعر عن طريق فحص جلوكوز الدم بوخز الإصبع. وإن لم تتطابق الأعراض أيضًا مع قراءات مستشعر الجلوكوز، يجب عليك التأكد من خلال إجراء فحص الجلوكوز بالدم بوخز الإصبع.

س: أتلقى "-- --" بدلاً من قراءات مستشعر الجلوكوز في التطبيق.

ج: قد لا تحصل على أي من قراءات مستشعر الجلوكوز عندما لا يكون هناك اتصال بين جهاز الإرسال الذكي الخاص بك والمستشعر أو بين جهاز الإرسال الذكي والجهاز المحمول. كما قد لا تتلقى أي قراءات عند تنشيط أحد التنبيهات الواردة أدناه:

- No sensor detected.
- قراءة مستشعر الجلوكوز Out of Range High أو Out of Range Low.
- Low Sensor Temperature.
- High Ambient Light.
- Sensor Check.
- High Smart Transmitter Temperature.
- High Sensor Temperature.
- Empty Battery.
- Calibration Past Due.
- New Sensor Detected.
- Sensor Replacement.
- Calibration Expired.
- Smart Transmitter Error.
- Transmitter Replacement Alert.
- Sensor Suspend Alert.

يرجى اتباع التعليمات المذكورة في رسالة الإشعار لمسح التنبيه.

اتخاذ قرارات العلاج

س: ما المعلومات التي يجب وضعها بالاعتبار قبل اتخاذ قرار العلاج؟

ج: قبل اتخاذ قرار علاج، يجب أن تأخذ في الاعتبار قيمة مستشعر الجلوكوز، والرسم البياني للاتجاه، وسهم الاتجاه، وأي تنبيهات من نظام Eversense E3 CGM. وإذا لم يتم عرض سهم الاتجاه، فذلك يعني أن النظام لا يحتوي على بيانات كافية لعرض الاتجاه ومعدل التغيير. ويجب ألا تتخذ قرار علاج بناءً على قيمة مستشعر الجلوكوز فقط.

س: لماذا تظهر قيمة الجلوكوز لدي باللون الرمادي؟

ج: عندما لا يحتوي النظام على بيانات كافية لعرض سهم الاتجاه، قد يتم عرض قيمة مستشعر الجلوكوز باللون الرمادي. ويجب ألا تتخذ قرار علاج بناءً على قيمة مستشعر الجلوكوز فقط.

س: لماذا ينبغي أن أجري اختبارًا بوخز الإصبع باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم؟

ج: ينبغي عليك إجراء اختبار جلوكوز الدم باستخدام جهاز قياس:

- عندما يحين وقت المعايرة.
- عند عدم عرض قيمة الجلوكوز.
- عند عدم عرض سهم الاتجاه.
- عندما لا تتطابق أعراضك مع معلومات الجلوكوز المعروضة.
- عند عرض قيمة الجلوكوز بالمستشعر باللون الرمادي.
- عند عرض شريط الحالة باللون البرتقالي.
- إن كنت تتناول أدوية من نوع النتراسيكلين.

أسهم الاتجاهات

س: أسهم الاتجاهات وتنبهات الجلوكوز لديّ لا يتطابقان.

ج: تبيّن أسهم الاتجاهات معدل التغير في مستويات الجلوكوز واتجاهه. على سبيل المثال، قد يكون لديك سهم اتجاه يشير لأعلى أو لأسفل (مما يوضح وجود تغيرات بطيئة أو سريعة). تنذرك تنبيهات الجلوكوز عندما يصل مستوى الجلوكوز الحالي لديك إلى مستوى التنبيه الذي حدّدته، بغض النظر عن معدل التغير أو اتجاهه.

س: سهم الاتجاه غير موجود لديّ.

ج: يستخدم نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة آخر 20 دقيقة من بيانات الجلوكوز المستمرة لحساب سهم الاتجاه وعرضه. عند عدم توافر قيم مستشعر كافية لإجراء الحساب، لا يتم عرض السهم. لا تتخذ قرارات علاج ما لم ترَ قيمة الجلوكوز، وسهم الاتجاه، وتضع في اعتبارك الاتجاهات والتنبيهات الأحدث.

التطبيق

س: ماذا سيحدث إذا أعدت تثبيت التطبيق؟

ج: عند إعادة تثبيت التطبيق، سيقوم التطبيق بتنزيل البيانات التاريخية من آخر 3 أيام فقط.

س: ما إصدار التطبيق المثبت على جهازي المحمول؟

ج: يمكنك العثور على إصدار برنامج التطبيق عن طريق الضغط على **Menu > About > Product Information**.

س: كيف سيتم تحديث تطبيقي؟

ج: اتبع عملية الحفاظ على تطبيق الجهاز المحمول محدثًا من خلال متجر Apple App Store أو Google Play Store.

س: ما الأجهزة المتوافقة مع تطبيق Eversense App؟

ج: تفضل بزيارة الموقع

<https://global.eversensedibabetes.com/compatibility>

للإطلاع على قائمة بالأجهزة المتوافقة.

س: هل ما زال بإمكانني استخدام جهاز الإرسال الذكي نفسه

إذا انتقلت إلى جهاز محمول جديد؟

ج: ستحتاج إلى تثبيت التطبيق على جهازك المحمول الجديد وإقرانه مع جهاز الإرسال الذكي الخاص بك. ستتم مزامنة آخر 3 أيام من البيانات التاريخية مع التطبيق على الجهاز المحمول الجديد.

س: هل يمكنني حذف حساب Eversense الخاص بي؟

ج: إذا قمت بحذف حسابك، فسيكون حذفًا نهائيًا، ولن تستطيع الوصول إلى بيانات CGM الخاصة بك على تطبيق الهاتف المحمول Eversense Mobile App، أو على حساب Eversense DMS الخاص بك. إذا كنت تستخدم تطبيق Eversense NOW للهاتف المحمول، فلن تتمكن من عرض بيانات Eversense CGM عن بُعد بعد الآن. لا يمكنك استخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني لإنشاء حساب جديد. لبدء عملية حذف الحساب، اضغط على **Delete Account** في صفحة تسجيل الدخول.

س: ما المقصود بخيار **Do Not Disturb**؟

ج: عند تمكين **Do Not Disturb** في إعدادات تطبيق Eversense App، سيتوقف تطبيق الهاتف المحمول عن عرض التنبيهات غير الحرجة. كما سيتوقف جهاز الإرسال الذكي عن تقديم التنبيهات بالذبذبة بالنسبة للتنبيهات غير الحرجة. وسيستمر توفير التنبيهات الحرجة عبر جهاز الإرسال الذكي وتطبيق الجهاز المحمول.

لاحظ أن ميزة عدم الإزعاج **Do Not Disturb** في هاتفك الذكي تعطى على خيار **Do Not Disturb** في التطبيق. لذلك؛ إذا كانت ميزة عدم الإزعاج **Do Not Disturb** في هاتفك الذكي قيد التشغيل، فلن تتلقى التنبيهات على جهاز الإرسال الذكي أو في التطبيق. ومع ذلك، يمكنك، من خلال بعض أنظمة التشغيل للأجهزة المحمولة، تمكين تنبيهات انخفاض الجلوكوز من تجاوز إعدادات الصوت بهاتفك. انظر إعدادات الصوت للاطلاع على المزيد من المعلومات. انتبه إلى أن بعض التطبيقات قد تقوم بتمكين ميزة عدم الإزعاج **Do Not Disturb** على هاتفك تلقائيًا.

س: لماذا يعرض شريط الحالة لدي كلمة "syncing"؟

ج: ستظهر كلمة "syncing" في شريط الحالة عندما يتصل جهازك المحمول بجهاز الإرسال الذكي الخاص بك.

س: تظهر إعدادات الجلوكوز وإعدادات الملف التعريفي المؤقت باللون الرمادي ولا يمكنني تعديلها.

ج: من الضروري إقران تطبيقك بجهاز الإرسال الذكي، ليمكنك تعديل إعدادات الجلوكوز والملف التعريفي المؤقت.

س: هل يمكنني تعديل حدث الإدخال اليدوي لمستوى الجلوكوز في الدم؟

ج: لا يمكن تعديل الإدخالات اليدوية للمعايرة والإدخالات اليدوية لجلوكوز الدم.

س: إن قمت بإخفاء حدث ما، فهل يمكنني استعادته؟

ج: لا يمكن استعادة إدخالات الأحداث التي تم إخفاؤها.

س: ما فترات التكرار التي يمكنني تعيينها للجلوكوز المرتفع والمنخفض؟

ج: بالنسبة للجلوكوز المرتفع، يمكن أن يكون الفاصل الزمني للتكرار ما بين 15 و180 دقيقة، بزيادات قدرها 15 دقيقة. بالنسبة للجلوكوز المنخفض، يمكن أن يكون الفاصل الزمني للتكرار ما بين 5 و30 دقيقة، بزيادات قدرها 5 دقائق.

المستشعر

س: هل يمكن إدخال المستشعر في مكان آخر في الجسم غير أعلى ذراعي؟

ج: تم اختبار نظام Eversense E3 CGM في أعلى الذراع فقط في الدراسات السريرية، ولا ينبغي إدخال المستشعر في أماكن أخرى.

س: متى يجب استبدال المستشعر الخاص بي؟

ج: يدوم المستشعر الخاص بك حتى 180 يومًا. وستتلقى

تنبيهات دورية (قبل 60 و30 و14 و7 و3 أيام وقبل يوم واحد) لتذكيرك بوقت الحاجة إلى استبدال المستشعر. اتصل بمزود الرعاية الصحية الخاص بك، لجدولة موعد استبدال المستشعر.

س: هل يمكنني إطالة عمر المستشعر؟

ج: لن يقدم المستشعر المزيد من قراءات المستشعر بعد انتهاء العمر الافتراضي للارتداء.

س: أين يمكنني العثور على الرقم التسلسلي للمستشعر؟

ج: يمكنك الاطلاع على الرقم التسلسلي للمستشعر عن طريق الضغط على **About > My Sensor > Menu**.

س: لقد ربطت للتو مستشعراً مع جهاز الإرسال الذكي لأول مرة، لكن تاريخ و/أو وقت الإدخال لا يظهران عندما أضغط على **About > My Sensor**.

ج: قد يستغرق اكتمال عملية الربط مدة تصل إلى 10 دقائق. احرص على أن يكون جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر. تأكد من أن شاشة **LINKED SENSOR** تعرض علامة لتأكيد اكتمال عملية الربط **Linking Process Complete**. انتقل إلى شاشة **MY GLUCOSE** وانتظر لمدة دقيقتين تقريباً. ارجع إلى شاشة **MY SENSOR**.

إذا لم يتم عرض تاريخ ووقت الإدخال الصحيحين، فاتبع هذه الخطوات:

1. قم بفك جهاز الإرسال الذكي من موضع الإدخال. قم بتوصيله بكابل الشحن ومصدر الطاقة. قم بتوصيل مصدر الطاقة بمنفذ الكهرباء في الحائط ثم افصله وفكه من كابل الشحن.
2. أعد وضع جهاز الإرسال الذكي فوق المستشعر. انتقل إلى **About > My Sensor** وتأكد من صحة تاريخ الإدخال ووقته. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بدعم العملاء.

س: لماذا أرى الإشعار “New Sensor Detected”؟

ج: تظهر هذه الرسالة عندما يكتشف جهاز الإرسال الذكي الخاص بك مستشعرًا جديدًا وبذلك يمكنك ربط جهاز الإرسال الذكي مع المستشعر. يمكن ربط جهاز الإرسال الذكي مع مستشعر واحد فقط في كل مرة. إذا رأيت رسالة **New Sensor Detected** ولديك مستشعر تم إدخاله بالفعل وربطه مع جهاز الإرسال الذكي الخاص بك، فاضغط على **Not Now**. إذا لم تكن متأكدًا، فاتصل بدعم العملاء للاطلاع على المزيد من المعلومات.

س: لماذا يدخل نظام مراقبة الجلوكوز المستمرة إلى مرحلة التهيئة مرة أخرى؟

ج: ستعود الدخول إلى مرحلة التهيئة لأي من الأسباب التالية:

- انتهاء فترة المعايرة من دون أن تقوم بإدخال قيمة اختبار بوخز الإصبع.
- اختلاف 3 أو أكثر من قراءات جلوكوز الدم بشكل كبير عن قراءات مستشعر الجلوكوز الحالية.
- عدم شحن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك خلال 16 ساعة من تنبيه نفاذ شحن البطارية.
- إذا قمت بتغيير الوقت يدويًا في جهازك المحمول، فإن جهاز الإرسال الذكي الخاص بك سيقوم بالمزامنة وبدء التشغيل من جديد مع جهازك المحمول.

- تم ربط جهاز إرسال جديد بمستشعر موجود. على سبيل المثال، إن قمت باستبدال جهاز الإرسال الحالي لديك.
- إن تم توجيهك من خلال ممثل دعم العملاء بإعادة ربط المستشعر الخاص بك.

س: هل من المقبول لفني التصوير بالرنين المغناطيسي أن يرتدي نظام Eversense E3 CGM؟

ج: نعم، يمكن لفني التصوير بالرنين المغناطيسي ارتداء نظام Eversense E3 CGM. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يخضعون للتصوير بالرنين المغناطيسي مع مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 1.5 تسلا أو 3.0 تسلا، يمكن أن يظل المستشعر في مكانه تحت الجلد، ولكن يجب إزالة جهاز الإرسال الذكي وتركه خارج الغرفة. انظر معلومات السلامة الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على مزيد من التفاصيل.

الأحداث

س: كيف يمكنني تصنيف أحداثي على شاشة
؟EVENT LOG

ج: تتضمن شاشة **EVENT LOG** فلتر تصنيف بأعلى الشاشة. اضغط على أيقونة فلتر التصنيف المرغوب فيه لإدراج الأحداث واستبعادها من القائمة. خيار التصنيف الافتراضي هو عرض كل الأحداث.

المزامنة

س: لماذا أرى أحياناً شريط تقدم باللونين الأزرق والأبيض على أعلى الشاشة؟

ج: سترى شريط تقدم المزامنة هذا لعدة أسباب:

- كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك خارج نطاق المستشعر لفترة ويقوم بإعادة المزامنة.
- أغلقت تطبيق Eversense App تمامًا وأعدت تشغيله.
- فقد جهازك المحمول شحن البطارية وأعيد شحنه.

الاختصارات

س: هل هناك اختصار للوصول إلى شاشة **CONNECT**؟

ج: إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك غير متصل بالتطبيق، فعندما تضغط على شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة، تظهر شاشة **CONNECT**.

س: هل هناك اختصار لإدخال حدث، مثل الوجبات أو التمارين؟

ج: في شاشة **MY GLUCOSE** اضغط على الرسم البياني لعرض شاشة **EVENT ENTRY**.

س: هل هناك طريقة لتحديد تاريخ لعرضه على شاشة **MY GLUCOSE** بدلاً من التمرير للخلف؟

ج: نعم، اضغط على شريط **"Today"** الموجود فوق الرسم البياني مباشرة. ستظهر نافذة منبثقة لكي تحدد فيها التاريخ المرغوب في عرضه على الرسم البياني.

س: إذا كنت أستعرض تاريخاً/وقتاً في الماضي على شاشة **MY GLUCOSE**، هل هناك اختصار يعيدني إلى التاريخ والوقت الحاليين؟

ج: نعم، اضغط على قيمة الجلوكوز/سهم الاتجاه للعودة إلى التاريخ/الوقت الحالي على شاشة **MY GLUCOSE**.

س: هل هناك اختصار للوصول إلى شاشة **ALERT HISTORY**؟

ج: إذا كان جهاز الإرسال الذكي الخاص بك متصلاً بالتطبيق، فيمكنك الضغط على شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة لعرض شاشة **ALERT HISTORY**.

19. أداء الجهاز

يسرد هذا القسم ميزات أداء الجهاز.

أداء الدراسة السريرية

تم تقييم سلامة نظام Eversense E3 CGM وفعاليتته أثناء دراسة PROMISE السريرية، التي أُجريت في الولايات المتحدة. تستند البيانات المدرجة في قسم "أداء الجهاز" هذا إلى البيانات التي تم جمعها أثناء الدراسة باستخدام خوارزمية جديدة (SW604) وتعديل بسيط في تصميم المستشعر (مستشعر E3). تم إجراء تقييمات الدقة في عدة نقاط أثناء الدراسة وطلب من الخاضعين للدراسة أن يبلغوا عن أي أحداث مناوئة طوال الدراسة. يعكس قسم "السلامة" جميع المشاركين (العدد=181) في الدراسة.

الدراسة التقييمية PROMISE

كانت دراسة PROMISE عبارة عن دراسة محورية تتصف بأنها غير عشوائية ومتعددة المواقع وذات بعد مستقبلي. شارك مائة وواحد وثمانون (181) شخصًا بالغًا (18 عامًا فما فوق) مصابين بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 في الدراسة عبر 8 مواقع في الولايات المتحدة، وتم إدخال مستشعرين في ستة وتسعين (96) شخصًا، حيث تم إدخال مستشعر في كل ذراع. ثلاثة وأربعون (43) من المستشعرات الثانوية كانت عبارة عن مستشعرات SBA. وتفاعل المشاركون مع النظام لمعايرة الإشارات غير المتعلقة ببيانات الجلوكوز ومعالجتها. واستندت جميع قرارات رعاية مرضى السكري إلى قيم جلوكوز الدم والمعايير السريرية للرعاية. وتم قياس الدقة خلال زيارات العيادة التي استمرت طوال اليوم. وحدثت هذه الزيارات في الأيام 1 و7 أو 14 و22 و30 و60 و90 و120 و150 و180. وفي كل زيارة، تم تقييم دقة المستشعر بالنسبة إلى محلل مختبري قياسي يُعرف باسم YSI. وقورنت قراءات الجلوكوز في نفس اللحظة ما بين المحلل المرجعي والجهاز المتتابع. كما أُجريت زيارة متابعة لضمان السلامة بعد عشرة أيام من إزالة المستشعر.

الجدول 1 - الدقة بالنسبة إلى مُحلل YSI في دراسة *PROMISE

متوسط الفارق النسبي المطلق	النسبة المئوية لقراءات نظام CGM ضمن				الرقم الإجمالي لقيم YSI وCGM المقترنة
	النسبة المئوية 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 30/30% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 20/20% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 15/15% من القيمة المرجعية	
8.5%	99.6	98.6	93.9	87.3	12,034

*قيم الجلوكوز ما بين 40 و400 mg/dL.

دقة Eversense E3 بالنسبة إلى قيم YSI في دراسة PROMISE

تم قياس الدقة من خلال مقارنة قيم مستشعر الجلوكوز Eversense E3 بقيم YSI للجلوكوز بالدم. بالنسبة لقيم الجلوكوز بالدم التي تقل عن 80 mg/dL أو تساويه، تم حساب متوسط الفارق المطلق بين النتيجتين. بالنسبة للقيم الأكبر من 80 mg/dL، تم حساب متوسط الفارق النسبي المطلق.

الجدول 2 - الدقة بالنسبة إلى قيم YSI في دراسة PROMISE*

متوسط الفارق النسبي المطلق (%)	عدد قراءات CGM-YSI المقترنة	نطاقات جلوكوز YSI (mg/dL)
8.5	12,034	الإجمالي
--	0	< 40*
7.5	592	40 - 60*
7.7	1,221	61 - 80*
8.6	5,067	81 - 180
7.4	3,300	181 - 300
6.9	1,457	301 - 350
6.4	375	351 - 400
9.5	25	> 400

*بالنسبة إلى $YSI \leq 80$ mg/dL، يتم تضمين الفارق في mg/dL بدلاً من فارق النسبة المئوية (%).

تم قياس الأداء كذلك من خلال حساب النسبة المئوية لقراءات مستشعر الجلوكوز ضمن 15 mg/dL أو 15% من قيمة YSI المرجعية. توضح هذه الجداول النسبة المئوية المتوافقة عبر مستويات متعددة، وضمن نطاقات جلوكوز مختلفة، وخلال أيام مختلفة أثناء ارتداء المستشعر. النتائج في نطاقات الجلوكوز التي تبلغ 80 mg/dL أو أقل تعكس النسبة المئوية ضمن mg/dL، والنتائج في نطاقات الجلوكوز التي تزيد عن 80 mg/dL تعكس النسبة المئوية ضمن القيمة المرجعية. وعلى سبيل المثال، كانت قيم الجلوكوز ما بين 40 و 60 mg/dL ضمن 15 mg/dL من القيمة المرجعية 91.6% من الوقت.

الجدول 3 - إجمالي القيم المحددة للنسب المئوية للقراءات لـ Eversense E3 في دراسة PROMISE

النسبة المئوية لقراءات نظام CGM ضمن					القيمة المرجعية المقترنة لـ CGM و YSI	نطاق الجلوكوز لنظام CGM (mg/dL)
النسبة المئوية > 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 30/30% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 20/20% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 15/15% من القيمة المرجعية		
0.4	99.6	98.6	93.9	87.3	12,034	الإجمالي
0.7	99.3	98.6	96.5	91.6	574	40 - 60
0.2	99.8	98.9	93.8	89.7	1,178	61 - 80
0.4	99.6	98.5	93.2	85.1	5,078	81 - 180
0.4	99.6	98.4	93.7	87.0	3,493	181 - 300
0.4	99.6	99.2	96.8	93.3	1,191	301 - 350
0.4	99.6	98.7	93.8	87.3	520	351 - 400

النسبة المنوية لقراءات نظام CGM ضمن					متوسط الفارق النسبي المطلق (%)	اليوم
النسبة المنوية > 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المنوية 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المنوية 30/30% من القيمة المرجعية	النسبة المنوية 20/20% من القيمة المرجعية	النسبة المنوية 15/15% من القيمة المرجعية		
0.7	99.3	96.5	87.4	78.6	11.2	اليوم 1
1.5	98.5	94.7	88.0	81.9	10.0	اليوم 7
0.0	100.0	99.0	95.0	87.4	7.4	اليوم 14
0.1	99.9	99.2	95.7	88.9	8.4	اليوم 22
0.7	99.3	98.2	93.4	85.8	8.2	اليوم 30
0.2	99.8	98.6	94.2	87.9	8.6	اليوم 60
0.1	99.9	99.8	97.1	93.1	7.0	اليوم 90
0.1	99.9	99.6	96.1	89.2	8.4	اليوم 120
0.1	99.9	99.5	91.9	84.0	8.8	اليوم 150
0.3	99.7	99.3	98.0	93.1	7.4	اليوم 180

أداء تنبيه Eversense E3

تظهر الجداول في هذا القسم تقييم أداء التنبيه. يُظهر معدل اكتشاف الأحداث المؤكدة Confirmed Event Detection Rate النسبة المئوية للوقت الذي أكد فيه نظام Eversense E3 CGM القيمة المرجعية من خلال تقديم تنبيه خلال فترة 15 دقيقة لقيمة مرجعية تتجاوز حد إعداد التنبيه. ويُظهر معدل عدم اكتشاف الأحداث Missed Detection Rate النسبة المئوية للوقت الذي لم يقدم فيه نظام Eversense E3 CGM تنبيهاً خلال فترة 15 دقيقة لقيمة مرجعية تتجاوز حد إعداد التنبيه. بينما يُظهر معدل التنبيه الحقيقي True Alert Rate النسبة المئوية للوقت الذي تم فيه تأكيد التنبيه من نظام CGM بواسطة قيمة مرجعية خلال فترة 15 دقيقة من ظهور التنبيه. بينما يُظهر معدل التنبيه الزائف False Alert Rate النسبة المئوية للوقت الذي تم فيه تأكيد التنبيه من نظام CGM بواسطة قيمة مرجعية خلال فترة 15 دقيقة من ظهور التنبيه.

يوضح الجدول أدناه تقييماً لقدرة نظام CGM Eversense E3 على اكتشاف مستويات الجلوكوز المرتفع والمنخفض، وتقييم التنبيهات الإيجابية الحقيقية مقابل التنبيهات الإيجابية الزائفة. ويتم عرضها كنسب مئوية من التنبيهات المقدمة مقارنةً بقيمة YSI المرجعية عند حدود مختلفة.

الجدول 5 - أداء تنبيه Eversense E3 للجلوكوز المرتفع والمنخفض (الحددي فقط) في دراسة PROMISE

معدل التنبيه الزائف	معدل التنبيه الحقيقي	معدل عدم اكتشاف الأحداث	معدل اكتشاف الأحداث المؤكدة	إعداد التنبيه (mg/dL)	
18%	82%	24%	76%	60	تنبيه منخفض
10%	90%	11%	89%	70	
8%	92%	7%	93%	80	
7%	93%	4%	96%	90	
3%	97%	1%	99%	120	تنبيه مرتفع
4%	96%	1%	99%	140	
5%	95%	2%	98%	180	
5%	95%	3%	97%	200	
5%	95%	3%	97%	220	
6%	94%	3%	97%	240	
10%	90%	12%	88%	300	

يوضح الجدول أدناه تقييماً لقدرة نظام Eversense E3 CGM على اكتشاف مستويات التنبيهات المرتفعة والمنخفضة والتنبيهات التنبئية المرتفعة والمنخفضة، وتقييم التنبيهات الإيجابية الحقيقية مقابل التنبيهات الإيجابية الزائفة. ويتم عرضها كنسب مئوية من التنبيهات المقدمة مقارنةً بقيم YSI المرجعية عند حدود مختلفة.

الجدول 6 – أداء التنبيهات المرتفعة والمنخفضة والتنبئية لـ Eversense E3 (الحدية والتنبئية) في دراسة PROMISE

معدل التنبيه الزائف	معدل التنبيه الحقيقي	معدل عدم اكتشاف الأحداث	معدل اكتشاف الأحداث المؤكدة	إعداد التنبيه (mg/dL)	
27%	73%	10%	90%	60	تنبيه منخفض
16%	84%	6%	94%	70	
13%	87%	3%	97%	80	
11%	89%	2%	98%	90	
4%	96%	1%	99%	120	
5%	95%	1%	99%	140	تنبيه مرتفع
7%	93%	1%	99%	180	
7%	93%	1%	99%	200	
8%	92%	2%	98%	220	
9%	91%	2%	98%	240	
13%	87%	8%	92%	300	

توافق اتجاه معدل تغير Eversense E3

توضح المنطقة المظللة في الجدول أدناه التوافق بين اتجاهات جلوكوز Eversense E3 واتجاهات YSI المرجعية بينما يتجه الجلوكوز بمعدلات مختلفة (mg/dL بالدقيقة). على سبيل المثال، عندما يتجه الجلوكوز بمعدل بين 1- mg/dL/minute و 1 mg/dL/minute، تتوافق اتجاهات جلوكوز Eversense E3 مع الاتجاهات المرجعية خلال 90% من الوقت.

الجدول 7 - توافق اتجاه معدل تغير Eversense E3 في دراسة PROMISE

معدل التغير المرجعي (mg/dL/minute) النسبة المئوية للأزواج المتطابقة ضمن كل قيمة مرجعية نطاق الاتجاه في كل نطاق CGM ROC						اتجاه مراقبة الجلوكوز المستمرة (mg/dL/min)
الإجمالي	> 2	(1, 2]	[-1, 1]	[-2, -1)	< -2	
163	0%	0%	41%	35%	24%	< -2
824	0%	0%	59%	36%	4%	[-2, -1)
8,716	1%	5%	90%	4%	0%	[-1, 1]
896	11%	42%	46%	1%	0%	(1, 2]
336	35%	40%	24%	0%	0%	> 2
10,935						

تطابق Eversense E3 مع قيم YSI

توضح المنطقة المظللة في الجداول أدناه النسبة المئوية لقيم YSI المرجعية التي كانت في نفس النطاق مثل قيم مستشعر الجلوكوز. على سبيل المثال، عندما تكون قيمة مستشعر الجلوكوز بين 81 mg/dL و 120 mg/dL، تكون قيم YSI المرجعية في نفس النطاق خلال 76% من الوقت.

الجدول 8 - التطابق مع نطاق YSI خلال جميع الأيام في دراسة PROMISE

النسبة المئوية للأزواج المتطابقة في كل نطاق جلوكوز وفقاً لقيم YSI لكل نطاق جلوكوز CGM (بوحدة القياس mg/dL)											عدد قراءات CGM-YSI المقترنة	CGM (mg/dL)
> 400	351-400	301-350	251-300	201-250	161-200	121-160	81-120	61-80	40-60	< 40		
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	36%	62%	0%	574	40 - 60
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	66%	19%	0%	1,178	61 - 80
0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%	76%	11%	0%	0%	2,066	81 - 120
0%	0%	0%	0%	0%	14%	71%	14%	0%	0%	0%	2,067	121 - 160
0%	0%	0%	0%	13%	66%	21%	0%	0%	0%	0%	1,648	161 - 200
0%	0%	1%	15%	68%	15%	1%	0%	0%	0%	0%	1,437	201 - 250
0%	1%	25%	56%	17%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1,353	251 - 300
0%	12%	70%	17%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1,191	301 - 350
5%	42%	51%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	520	351 - 400
26%	52%	21%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	155	> 400

الجدول 9 - التطابق مع نطاق YSI خلال اليوم 1 في دراسة PROMISE

النسبة المئوية للأزواج المتطابقة في كل نطاق جلوكوز وفقاً لقيم YSI لكل نطاق جلوكوز CGM (بوحدة القياس mg/dL)											عدد القراءات CGM-YSI المقترنة	CGM (mg/dL)
> 400	351-400	301-350	251-300	201-250	161-200	121-160	81-120	61-80	40-60	< 40		
0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	3%	45%	51%	0%	120	40 - 60
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	54%	10%	0%	146	61 - 80
0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	70%	5%	0%	0%	271	81 - 120
0%	0%	0%	0%	3%	21%	62%	14%	0%	0%	0%	202	121 - 160
0%	0%	0%	0%	16%	51%	33%	0%	0%	0%	0%	124	161 - 200
0%	0%	0%	27%	51%	19%	4%	0%	0%	0%	0%	75	201 - 250
0%	0%	18%	57%	24%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	121	251 - 300
0%	0%	64%	33%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	86	301 - 350
0%	9%	84%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58	351 - 400
0%	48%	48%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25	> 400

التوافق في ثبات المعايرة

يقارن الجدول أدناه النسبة المئوية لقيم مستشعر الجلوكوز مقابل قيم YSI المرجعية خلال نقاط زمنية مختلفة بعد إدخال المعايرة. على سبيل المثال، في الجدول أدناه، كانت 89.7% من قيم Eversense E3 ضمن 15 mg/dL (للقرءات المرجعية لـ 80 mg/dL أو أقل)، وضمن 15% (للقرءات المرجعية الأكبر من 80 mg/dL) من القيمة المرجعية بعد مرور من 8 إلى 10 ساعات بعد إدخال المعايرة.

الجدول 10 - توافق ثبات معايرة Eversense E3 في دراسة PROMISE

النسبة المئوية لقرءات نظام CGM ضمن					عدد قرءات CGM-YSI المقترنة	الوقت من المعايرة
النسبة المئوية > 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 30/30% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 20/20% من القيمة المرجعية	النسبة المئوية 15/15% من القيمة المرجعية		
0.1	99.9	98.7	94.1	88.8	2,638	(0, 2) من الساعات
0.5	99.5	98.5	94.4	87.2	1,905	(2, 4) من الساعات
0.7	99.3	98.1	93.3	85.3	1,404	(4, 6) من الساعات
0.4	99.6	97.7	91.5	83.0	1,043	(6, 8) من الساعات
0.4	99.6	98.8	93.9	89.7	1,041	(8, 10) من الساعات
0.5	99.5	97.7	94.1	87.8	1,091	(10, 12) من الساعات
0.7	99.3	99.0	93.4	85.8	590	(12, 14) من الساعات
0.0	100.0	100.0	91.8	82.7	440	(14, 16) من الساعات
0.0	100.0	99.5	93.9	87.6	379	(16, 18) من الساعات

الجدول 10 - توافق ثبات معايرة Eversense E3 في دراسة PROMISE (تابع)

النسبة المنوية لقراءات نظام CGM ضمن					عدد قراءات CGM-YSI المقترنة	الوقت من المعايرة
النسبة المنوية > 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المنوية 40/40% من القيمة المرجعية	النسبة المنوية 30/30% من القيمة المرجعية	النسبة المنوية 20/20% من القيمة المرجعية	النسبة المنوية 15/15% من القيمة المرجعية		
0.3	99.7	98.4	97.0	90.0	370	[18, 20] من الساعات
0.2	99.8	99.5	94.5	88.3	436	[20, 22] من الساعات
0.2	99.8	99.4	96.2	89.7	522	[22, 24] من الساعات
0.0	100.0	99.4	98.2	93.5	168	[24, 26] من الساعات
0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	7	[26, 28] من الساعات

عمر المستشعر

يقيس عمر المستشعر نسبة المستشعرات المؤية التي يمكنها العمل خلال المدة المستهدفة البالغة 180 يوماً. في دراسة PROMISE، عمل 90% من المستشعرات خلال فترة الـ 180 يوماً. متوسط عدد الأيام كان 175 يوماً.

النسبة المنوية للمستشعرات التي استمرت 60 و120 و180 يوماً

متوسط عدد الأيام	عمر المستشعر	الأيام
175	98%	60
	98%	120
	90%	180

استمرت دراسة PROMISE لمدة 180 يوماً، وتم تسجيل عدد الأحداث المناوئة ذات الصلة. كان نظام Eversense E3 CGM جيد التحمل خلال الدراسة. وخلال أيام ارتداء المستشعر في الدراسة والتي بلغت 31,373 يوماً، لم يتم التعرض لأحداث مناوئة غير متوقعة. وتم الإبلاغ عن تسعة وخمسين من الأحداث المناوئة من خلال 37 مشاركاً. ولم يسفر أي من الأحداث المناوئة عن دخول المستشفى.

الجدول 11 – الأحداث المناوئة (جميع الخاضعين للدراسة، العدد = 181)

عدد الخاضعين للدراسة (% من الخاضعين للدراسة)	عدد الأحداث	نوع الحدث
37 (20.4)	59	تهيج الجلد، في موضع الرقعة اللاصقة أو موضع الإدخال (بما في ذلك، احمرار الجلد، والحكة، والطفح الجلدي، والتهاب الجلد التماسي، والتورم المصلي)
11 (6.1)	16	ضمور الجلد
4 (2.2)	4	نقص التصبغ
3 (1.7)	4	العدوى (ذات صلة بالإجراء)
2 (1.1)	2	العدوى (ليست ذات صلة بالإجراء)
1 (0.6)	1	الكدمات
11 (6.1)	19	النزيف
3 (1.7)	3	الألم
6 (3.3)	7	التنميل في الذراع
1 (0.6)	1	الارتعاش
1 (0.6)	1	شرائط إغلاق الشق الجلدي اللاصقة لا تثبت

20. المواصفات الفنية

المستشعر

الميزة	الوصف
الأبعاد	الطول: 18.3 مم القطر: 3.5 مم
المواد	بولي ميثيل ميثاكريلات البوليمر المتجانس (PMMA) - 86 ملجم، هيدروجيل مكون في الأساس من هيدروكسي إيثيل ميثاكريليت (HEMA) ويحتوي على مؤشر جلوكوز - 2.0 ملجم، بلاتين - 0.012 ملجم، سيليكون - 4.1 ملجم، أسيتات ديكساميثازون - 1.7 ملجم، إيبوكسي 2-301 - 0.62 ملجم
نطاق الجلوكوز	40-400 mg/dL
عمر المستشعر	حتى 180 يومًا
المعايرة	جهاز قياس الجلوكوز بالدم للمراقبة الذاتية المتاح تجاريًا
نطاق المعايرة	40-400 mg/dL
التعقيم	التعقيم باستخدام أكسيد إيثيلين

جهاز الإرسال الذكي

الميزة	الوصف
الأبعاد	الطول: 48.0 مم العرض: 37.6 مم السُمك: 8.8 مم
المواد	الهيكل: بولي كربونات
الوزن	11.3 جم
مصدر الطاقة	بطاريات ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن (غير قابلة للاستبدال)
ظروف التشغيل	5 - 40 درجة مئوية (41 - 104 درجة فهرنهايت)
عمر التشغيل	12 شهرًا
ظروف التخزين	0 - 35 درجة مئوية (32 - 95 درجة فهرنهايت)
الحماية من الرطوبة	IP67: تم الغمر حتى عمق متر في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة
الحماية من الصدمة الكهربائية	جزء مستخدم من النوع BF
وقت الشحن باستخدام مهايي التيار المتردد	15 دقيقة حتى الشحن الكامل
مسافة الاتصال	بين التطبيق وجهاز الإرسال الذكي تصل إلى 24.9 قدمًا لن يعمل الاتصال اللاسلكي بالتطبيق جيدًا عند الاتصال عبر الماء. سينخفض النطاق إذا كنت في مغطس استحمام أو فراش مائي أو حمام سباحة، إلخ.
ضغط المقصورة	700 هكتوباسكال إلى 1060 هكتوباسكال
نطاق الرطوبة النسبية (من دون تكاثف)	15% إلى 90%
الارتفاع	10,000 قدم

مصدر الإمداد بالطاقة والشاحن

الميزة	الوصف
الفئة	الثانية
تيار الدخل	دخل تيار متردد، 100-240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز، 0.3-0.15 أمبير
خرج التيار المستمر	5 فولت تيار مستمر، 1 أمبير (5.0 وات)
الحماية من الرطوبة (حامل الشحن)	IP22

كابل USB* للشحن والتنزيل

الميزة	الوصف
دخل/خرج	5 فولت تيار مستمر، 1 أمبير
النوع	USB-A إلى USB micro-B
الطول	91 سم (36 بوصة)

*في حالة إساءة استخدام كابل USB، قد يشكل خطر الاختناق. يمكن توصيل كابل USB بمصدر الطاقة/الشاحن وشحنه باستخدام منفذ التيار المتردد. لعزل النظام، افصل الشاحن/مصدر الإمداد بالطاقة من المنفذ. إذا كنت تشحن جهاز الإرسال الذكي باستخدام منفذ USB في الكمبيوتر الشخصي لديك، فتأكد من أن الكمبيوتر الشخصي يتوافق مع معيار السلامة IEC 60950-1 (أو ما يعادله).

المعايير الكهربائية والخاصة بالسلامة

الإرشاد وبيان الشركة المنتجة - الحصانة الكهرومغناطيسية

جهاز الإرسال معدّ للاستخدام في الوسط الكهرومغناطيسي المحدد في الجدول التالي. ينبغي على العميل أو مستخدم جهاز الإرسال أن يتأكد من استخدامه في هذه البيئة.


مواصفات الحصانة الكهرومغناطيسية لجهاز الإرسال

اختبار الحصانة	اختبار الحصانة	مستوى امتثال جهاز الإرسال	توجيهات الوسط الكهرومغناطيسي
تفريغ الكهرباء الاستاتيكية IEC 61000-4-2 (ESD)	8 ± كيلو فولت بالتلامس 15 ± كيلو فولت في الهواء	8 ± كيلو فولت بالتلامس 15 ± كيلو فولت في الهواء	ينبغي أن تكون الأرضيات من الخشب أو الاسمنت أو بلاط السيراميك. إذا كانت الأرضيات مغطاة بمادة صناعية، ينبغي ألا تقل الرطوبة النسبية عن 30%.
تردد الطاقة (110 فولت تيار متردد/60 هرتز، 230 فولت تيار متردد/50 هرتز) المجال المغناطيسي IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	ينبغي أن تكون المجالات المغناطيسية لتردد الطاقة بالمستويات المعروفة عن المواقع المعتادة في البيئة التجارية أو بيئة المستشفى المعتادة.

المعايير الكهربائية والخاصة بالسلامة (تابع)

يهدف نظام Eversense E3 CGM إلى استخدامه في البيئة الكهرومغناطيسية المذكورة بالتفصيل في الجدول أدناه. ينبغي أن يتأكد مستخدمو النظام من استخدامه وفق هذه المواصفات.

مواصفات الحصانة الكهرومغناطيسية للنظام

اختبار الحصانة	مستوى الاختبار IEC 60601	مستوى امتثال جهاز الإرسال	توجيهات الوسط الكهرومغناطيسي
التردد اللاسلكي الموجه IEC 61000-4-6 (الهاتف النكي فقط (الجهاز المتلقي))	3 < جذر متوسط المربع للجهد الكهربائي (150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا هرتز)	3 جذر متوسط المربع للجهد الكهربائي	قد يحدث التعارض بجوار المعدات التي عليها الرمز التالي: (())
التردد اللاسلكي الصادر IEC 61000-4-3	10 فولت/متر عند 80 ميغا هرتز إلى 2700 ميغا هرتز (تعديل AM)	3 جذر متوسط المربع للجهد الكهربائي	

ملاحظة 1: عند 80 ميغا هرتز و 800 ميغا هرتز، يسري مجال التردد الأعلى.

ملاحظة 2: قد لا تسري هذه الإرشادات على كل المواقع. يتأثر الانتشار الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس من الهياكل والأشياء والناس.

أ. نقاط قوة الحقل من أجهزة الإرسال الثابتة، مثل المحطات الأرضية للهواتف اللاسلكية (الخلوية/من دون أسلاك) والأجهزة اللاسلكية المتنقلة الأرضية، ولاسلكي الهواء، والبيث اللاسلكي على موجات AM و FM، وبيث التلفاز لا يمكن التنبؤ بها نظرياً بدقة. لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية الناتجة عن أجهزة الإرسال الثابتة بتردد لاسلكي، ينبغي النظر في إجراء مسح كهرومغناطيسي للموقع. إذا كانت قوة الحقل التي تم قياسها في الموقع حيث يتم استخدام نظام Eversense E3 CGM تتجاوز مستوى امتثال التردد اللاسلكي الساري أعلاه، فينبغي مراقبة نظام Eversense E3 CGM للتحقق من التشغيل العادي. إذا تمت ملاحظة أداء غير طبيعي، فقد تكون هناك إجراءات إضافية ضرورية مثل تغيير اتجاه نظام Eversense E3 CGM أو تغيير موضعه.

ب. على مدى نطاق التردد 150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا هرتز، ينبغي أن تقل قوة الحقل عن 10 فولت/متر.

المعايير الكهربائية والخاصة بالسلامة (تابع)

الإرشاد وبيان الشركة المنتجة - الانبعاثات الكهرومغناطيسية

تم تصميم نظام Eversense E3 CGM للأجهزة المحمولة للاستخدام في الوسط الكهرومغناطيسي المحدد في الجدول التالي. ينبغي على العميل أو مستخدم النظام أن يتأكد من استخدامه في هذه البيئة.

اختبار الانبعاثات	الامتثال	توجيهات الوسط الكهرومغناطيسي
انبعاثات التردد اللاسلكي CISPR 11	المجموعة 1	يستخدم نظام Eversense E3 CGM طاقة التردد اللاسلكي فقط في وظيفته الداخلية. ولهذا، تُعتبر انبعاثات التردد اللاسلكي منه منخفضة جداً وليس من المرجح أن تسبب أي تعارض مع المعدات الإلكترونية القريبة.
انبعاثات التردد اللاسلكي CISPR 11	الفئة ب	يتناسب نظام Eversense E3 CGM مع الاستخدام في كل المنشآت، بما في ذلك الأماكن المنزلية والمنشآت المتصلة بشكل مباشر بالشبكة العامة للإمداد بالطاقة منخفضة الجهد الكهربائي التي تزود المباني المستخدمة في الأغراض المنزلية.

مسافات الفصل الموصى بها بين معدات الاتصالات بالتردد اللاسلكي المحمولة/المتنقلة الأخرى والهاتف الذكي (الجهاز المتلقي)

اتبع تعليمات الشركة المنتجة الهاتف الذكي (أو الجهاز المتلقي الأخر) لمسافات الفصل. يستطيع العميل أو مستخدم الهاتف الذكي (أو الجهاز المتلقي الأخر) أن يساعد في منع التداخل الكهرومغناطيسي عن طريق الحفاظ على حد أدنى من المسافة بين معدات الاتصالات بالتردد اللاسلكي المحمولة/المتنقلة الأخرى (أجهزة الإرسال) والهاتف الذكي على الأقل 30 سم (حوالي 12 بوصة). تشمل معدات التردد اللاسلكي المحمولة/المتنقلة: أجهزة مراقبة الأطفال وساعات Bluetooth اللاسلكية وأجهزة توجيه اللاسلكي وأفران الميكرويف وأجهزة الكمبيوتر المحمول ذات مهايئات الواي فاي الداخلية والهواتف الخلوية بشبكة GSM وأجهزة المسح الضوئي بالتعرف عن طريق التردد اللاسلكي وجهاز كشف المعادن الأمني المحمول باليد الذي يستخدمه موظفو الأمن عادة.

الرموز على تطبيق Eversense CGM للجهاز المحمول

الرمز	الشرح
	تنبيه الجلوكوز يظهر عندما يكون الجلوكوز أعلى من نطاق التنبيه بارتفاع الجلوكوز وأقل من نطاق التنبيه بانخفاض الجلوكوز. تظهر الأيقونة على شاشة ALERT HISTORY .
	تنبيه الانخفاض التنبني أو انخفاض المعدل يشير إلى حدوث انخفاض في المعدل أو حدوث تنبيه بانخفاض تنبني في الجلوكوز. تظهر الأيقونة في شاشة ALERT HISTORY وعلى خط اتجاه الشاشة الرئيسية.
	تنبيه الارتفاع التنبني أو ارتفاع المعدل يشير إلى حدوث ارتفاع في المعدل أو حدوث تنبيه بارتفاع تنبني في الجلوكوز. تظهر الأيقونة في شاشة ALERT HISTORY وعلى خط اتجاه الشاشة الرئيسية.
	تنبيه البطارية الفارغة يظهر عندما تكون بطارية جهاز الإرسال الذكي فارغة.
	تنبيه انخفاض شحن البطارية يظهر عندما يكون شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي أقل من 10%.
	تنبيه جهاز الإرسال الذكي/المستشعر تظهر الأيقونة على شاشة ALERT HISTORY .
	إشعارات جهاز الإرسال الذكي/المستشعر تظهر عندما تكون هناك إشعارات مرتبطة بجهاز الإرسال الذكي أو المستشعر.
	تنبيه المعايرة يظهر عندما تكون هناك تنبيهات مرتبطة بالمعايرة.
	إشعار المعايرة يظهر في ALERT HISTORY عندما تكون هناك إشعارات ذات صلة بالمعايرة. تظهر الأيقونة أيضًا على خط اتجاه My Glucose وسجل الأحداث عند تسجيل قيمة الإدخال اليودي للجلوكوز في الدم.

الرموز على تطبيق الجهاز المحمول Eversense CGM Mobile App (تابع)

الرمز	الشرح
	المعايرة مقبولة يظهر على خط اتجاه الجلوكوز و EVENT LOG عندما يتم إدخال المعايرة وقبولها.
	المعايرة قيد التقدم يظهر على خط اتجاه الجلوكوز وسجل الأحداث، خلال 15 دقيقة تقريبًا، بينما تكون المعايرة قيد التقدم. ستتحول الأيقونة إما إلى اللون الأحمر أو الأسود أو الأزرق، عندما لا تكون المعايرة قيد التقدم.
	لم تكتمل المعايرة يظهر على خط اتجاه الجلوكوز وسجل الأحداث، عندما لا يتم جمع بيانات كافية لإكمال المعايرة. على سبيل المثال، عند إزالة جهاز الإرسال من على المستشعر خلال فترة المعايرة التي تبلغ 15 دقيقة تقريبًا.
	لا يمكن استخدام المعايرة يظهر على خط اتجاه الجلوكوز وسجل الأحداث عند إدخال معايرة لا يمكن استخدامها. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة المدخلة أقل من 40 mg/dL، أو أكثر من 400 mg/dL. في هذه الحالة، يتم حفظ قيمة المعايرة كقيمة إدخال يدوي للجلوكوز بالدم.
	اتصال النظام بنجاح يظهر عند اتصال جهاز الإرسال الذكي بالهاتف الذكي وارتباط المستشعر بجهاز الإرسال الذكي. تشير الأشرطة إلى قوة الاتصال.
	اتصال جهاز الإرسال والمستشعر يظهر قبل ربط جهاز الإرسال بالمستشعر، وعند قطع الاتصال ما بين جهاز الإرسال والمستشعر.
	اتصال جهاز الإرسال وتطبيق الجهاز المحمول يظهر عند قطع اتصال BLE ما بين جهاز الإرسال وتطبيق الجهاز المحمول.

الرموز على تطبيق الجهاز المحمول Eversense CGM Mobile App (تابع)

الرمز	الشرح
	تنبيهات متعددة (أكثر من تنبيه واحد أو حدث واحد) يظهر عندما يكون هناك تنبيهان أو حدثان أو أكثر في فترة زمنية قصيرة.
	أيقونات الحدث يظهر على خط اتجاه الجلوكوز وشاشة EVENT LOG بعد إدخال الحدث. الأحداث التي يمكن إدخالها هي:
 	الجلوكوز الوجبات
 	الأنسولين الصحة
	التمارين
	الملف الشخصي المؤقت يظهر عندما يكون الملف الشخصي المؤقت نشطاً.
	عدم الإزعاج (DND) يظهر عندما يكون إعداد عدم الإزعاج نشطاً.

الرموز الموجودة على العبوة والأجهزة

الشرح	الرمز
رقم القطعة	
الرقم التسلسلي	
جزء مستخدم من النوع BF	
إشعاع كهرومغناطيسي غير مؤين	
غير مصنوع من لاتكس المطاط الطبيعي	
يتم تعيين معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC ID) لكل الأجهزة الخاضعة للاعتماد	FCC ID
غير معقم	





الشرح	الرمز
راجع المستندات المصاحبة	
مؤشر تعليمات الاستخدام الإلكتروني	
تنبيه، راجع المستندات المصاحبة	
يُستخدم حتى	
الشركة المنتجة	
تاريخ التصنيع	
حدود درجة حرارة التخزين	
رقم الدفعة	LOT
الناقل التسلسلي العام (USB)	

الرموز الموجودة على العبوة والأجهزة (تابع)

الشرح	الرمز
لا تستخدمه إذا كانت العبوة تالفة	
يتم تعقيمه باستخدام أكسيد الإيثيلين	STERILE EO
حاجز تعقيم فردي: معقم باستخدام أكسيد الإيثيلين	
يقيد قانون الولايات المتحدة (الفيدرالي) عرض نظام Eversense E3 CGM للبيع، سواء بواسطة الطبيب أو بناءً على أمر منه	Rx only
اتبع تعليمات الاستخدام	
علامة تثبت أن الجهاز يفي بلوائح الأجهزة الطبية 2017/745	CE ²⁷⁹⁷
جهاز طبي (ملاحظة: على بطاقة الزرع، يشير هذا إلى اسم الجهاز)	MD

الشرح	الرمز
يُمنع استخدام إجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي بالنسبة لجهاز الإرسال الذكي	
السلامة في مجال الرنين المغناطيسي ضمن شروط محددة. عبارة عن عنصر يوضح مجال السلامة في بيئة الرنين المغناطيسي ضمن شروط محددة، تشمل شروطاً للمجال المغناطيسي الثابت، والحقول المغناطيسية المتدرجة المتغيرة بمرور الوقت، ومجالات التردد اللاسلكي. يُرجى الرجوع إلى قسم معلومات السلامة الخاصة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للاطلاع على المعلومات بشكل كامل.	
توجيه مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية من الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU	
للاستخدام مرة واحدة فقط	
لا تقم بإعادة التعقيم	

الرموز الموجودة على العبوة والأجهزة (تابع)

الشرح	الرمز
للاستخدام المتعدد من قبل مريض واحد	
يحتوي على مادة طبية	
معلومات إعادة التدوير	
الموزع	

الشرح	الرمز
المعرف الفريد للجهاز	
تاريخ الإدخال	
الطبيب أو مركز الرعاية الصحية المسؤول عن الزرع	
تعريف المريض (الاسم)	
الموقع الإلكتروني الخاص بمعلومات المريض	
المستورد	
المندوب المعتمد في الاتحاد الأوروبي	

الضمان المحدود لجهاز إرسال E3 Eversense الذكي

1. التغطية ومدة الضمان المحدود.

تضمن شركة Senseonics, Incorporated (يشار إليها "Senseonics") للمريض الأصلي والمستخدم النهائي ("أنت") لجهاز إرسال E3 Eversense الذكي ("جهاز الإرسال الذكي") أن جهاز الإرسال الذكي سيكون خاليًا من العيوب في المادة والصناعة في ظل الاستخدام العادي لمدة عام (365 يومًا) بدءًا من تاريخ تطبيق لأول مرة لجهاز الإرسال الذكي من مزود الرعاية الصحية الخاص بك ("فترة الضمان المحدود"). يعطيك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، وقد تحصل أيضًا على حقوق أخرى تختلف من سلطة قضائية لأخرى. يتم تقديم هذا الضمان المحدود بشرط أن تقدم إشعارًا كتابيًا إلى شركة Senseonics بأي عيوب في المادة و/أو الصناعة فورًا عند اكتشافها، وبشرط أن تقرر شركة Senseonics أن دعواك تعود إلى عيوب في المادة الأصلية و/أو الصناعة. إذا قدمت لك شركة Senseonics جهاز إرسال بديلاً وفق بنود هذا الضمان المحدود، فإن أي ضمان متبقٍ لجهاز الإرسال الذكي الأصلي سينتقل إلى جهاز الإرسال الذكي البديل وتنتهي فترة ضمان جهاز الإرسال الذكي البديل بعد مرور سنة على تاريخ حصولك على جهاز الإرسال الذكي لأول مرة من مزود الرعاية الصحية الخاص بك، وسيكون هذا الضمان لاغياً فيما يخص جهاز الإرسال الذكي الأصلي.

2. الاستثناءات من الضمان المحدود.

لا يسري الضمان المحدود إلا على جهاز الإرسال الذكي من تصنيع شركة Senseonics، وهو مشروط باستخدامك للملائم للمنتج. لا يغطي الضمان المحدود (أ) الضرر التجميلي أو الخدش أو الضرر الآخر للأسطح والأجزاء المكشوفة بسبب الاستخدام العادي و(ب) الضرر الناتج عن حادث، أو إهمال، أو تقصير آخر، أو إساءة استعمال، أو ضغط بدني أو كهربائي أو ميكانيكي كهربائي غير معناد، أو تعديل لأي جزء في المنتج و(ج) المعدات التي تم تعديلها لإزالة رقم المعرف أو تعديله أو جعله غير مقروء و(د) الأعطال الناتجة عن الاستخدام مع المنتجات أو الملحقات أو الأجهزة الطرفية غير المجهزة أو المعتمدة كتابيًا من شركة Senseonics و(هـ) الأجزاء المستهلكة (البطاريات) و(و) المعدات التي تم تفكيكها و(ز) التلف الناتج عن التشغيل أو الاختبار أو الصيانة أو التركيب أو التعديل غير الملائمين.

جهاز الإرسال الذكي مقاوم للماء حسب المواصفات المذكورة في دليل المستخدم. لا يغطي هذا الضمان المحدود التلف الناتج عن الماء إذا تعرض جهاز الإرسال الذكي للتشقق أو التلف بطريقة أخرى. لا يسري هذا الضمان المحدود على الخدمات أو المعدات أو البرمجيات المصاحبة التي قد تُستخدم مع جهاز الإرسال الذكي.

3. التزامات شركة Senseonics بموجب الضمان المحدود.

تعويضك الوحيد والحصري والالتزام الوحيد والحصري من شركة Senseonics بموجب هذا الضمان المحدود هو الإصلاح أو الاستبدال، وفقاً لما تراه من دون أن تدفع مقابل، لأي جهاز إرسال ذكي معيب بشرط أن ينشأ العيب وتتلقى شركة Senseonics دعوى شرعية خلال فترة الضمان المحدود. يجب عليك إعادة جهاز الإرسال الذكي المعيب إلى إدارة معتمدة لخدمة العملاء في Senseonics في حاوية شحن ملائمة توفر حماية كافية لجهاز الإرسال الذكي من حدوث تلف آخر ومع اسمك وعنوانك واسم مزود الرعاية الصحية الذي حصلت منه على جهاز الإرسال الذكي وعنوانه وتاريخ جهاز الإرسال الذكي ورقم تعريفه. للتعرف على مكان إرسال جهاز الإرسال الذكي، يرجى زيارة الموقع <https://global.eversensedibabetes.com>. عند تلقي جهاز الإرسال الذكي، إذا قررت شركة Senseonics أنه ضمن تغطية الضمان المحدود وأن التغطية ليست مستبعدة، فسوف تستبدله شركة Senseonics فوراً. إذا قررت شركة Senseonics أن جهاز الإرسال الذكي ليس ضمن تغطية الضمان المحدود، يجوز أن تشتري بديلاً أو أن تدفع مسبقاً كل رسوم الشحن إذا أردت إعادة جهاز الإرسال الذكي الأصلي.

يحصل جهاز الإرسال الذكي الذي تم إصلاحه أو استبداله على الضمان المتبقي لجهاز الإرسال الذكي الأصلي أو [30] يوماً من تاريخ الاستبدال أو الإصلاح، الأطول من بينهما.

4. حدود التزامات شركة Senseonics بموجب الضمان المحدود.

الضمان المحدود من شركة SENSEONICS المذكور أعلاه حصري ويحل مكان كل الضمانات الأخرى الصريحة أو الضمنية إما في الواقع أو بموجب القانون أو التشريع أو غير ذلك، وتستبعد شركة SENSEONICS صراحةً وترفض كل هذه الضمانات الأخرى، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - أي ضمان أو شرط ضمني بالقابلية للتسويق التجاري أو الملاءمة لغرض معين أو عدم الانتهاك أو الجودة المرضية أو عدم التداخل أو دقة المحتوى المعلوماتي أو ما ينشأ عن مسار التعامل أو القانون أو الاستخدام أو الممارسة التجارية. وباستثناء الحد المحظور بموجب القانون الساري، لن تتحمل شركة SENSEONICS المسؤولية عن أية تلافيات خاصة أو عارضة أو تابعة أو غير مباشرة أياً كان سببها ووفق أي نظرية للمسؤولية تنشأ بأي طريقة عن بيع أو استخدام أو إساءة استخدام أو عدم القدرة على استخدام أجهزة الإرسال الذكية أو أي نظام من أنظمة EVERSENSE E3 من شركة SENSEONICS. يسري هذا القيد حتى لو تم إبلاغ شركة SENSEONICS أو وكيلها بهذه الأضرار وبغض النظر عن أي فشل في الغرض الأساسي من هذا التعويض المحدود. لن يمتد هذا الضمان المحدود لأي أحد بخلافك باعتبارك المستخدم النهائي الأصلي لهذا المنتج وهو ينص على تعويضك الحصري. إذا كان أي جزء من هذا الضمان المحدود غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بسبب أي قانون، وفي حدود عدم قدرة شركة SENSEONICS بموجب القانون الساري على إخلاء المسؤولية عن أي ضمان ضمني أو الحد من مسؤولياتها، فإن نطاق هذا الضمان ومدته وحدود المسؤولية على شركة SENSEONICS سيكونون في الحد الأدنى المسموح به بموجب هذا القانون الساري.

مقدمة

الاستخدام المستهدف

نظام إدارة بيانات (DMS) Eversense معدّ للاستخدام كملحق متوافق مع منتجات Eversense CGM. فهو تطبيق على شبكة الإنترنت قد يُستخدم لعرض معلومات الجلوكوز من نظام Eversense CGM لديك وتحليلها وتخزينها.

للحصول على معلومات حول المتصفحات المتوافقة وإصدارات المتصفحات، يرجى زيارة global.eversenseddiabetes.com/compatibility.

ملاحظة مهمة: لا يقدم نظام إدارة بيانات **EVERSENSE** مشورة طبية. لا تتخذ أي قرارات علاجية دون استشارة فريق رعايتك الصحية.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية

يخضع استخدام نظام إدارة البيانات (DMS) Eversense لشروط وأحكام أحدث اتفاقية ترخيص للمستخدم النهائي من Eversense وسياسة الخصوصية لدى Eversense. يتم تحديث هذه المستندات من حين لآخر ويتم نشرها على الموقع global.eversenseddiabetes.com.

المساعدة والدعم

إذا كنت لا تفهم شيئاً في دليل المستخدم هذا، فاتصل بالموزع المحلي أو تفضل بزيارة global.eversenseddiabetes.com لتحديد مكان الموزع المحلي.

بدء التشغيل

Eversense DMS هو تطبيق يستند إلى متصفح الإنترنت (تطبيق على الإنترنت) يمكّنك من تحميل بيانات تطبيق Eversense المحمول من جهازك الذكي المتوافق إلى الإنترنت للحفظ والمراجعة المستمرة على نحو تلقائي.

برامج الحاسوب المكتبي تمكّن حاسوبك من الاتصال المباشر مع تطبيق الإنترنت. كما يمكنك تحميل بياناتك مباشرةً من جهاز الإرسال الذكي إلى حساب Eversense DMS عبر اتصال سلكي من خلال تنزيل برنامج الحاسوب المكتبي Eversense Client وتثبيته مباشرةً على حاسوبك.

إنشاء حساب جديد

قبل بدء استخدام تطبيق Eversense DMS، عليك التسجيل بصفتك مستخدم.

إذا كنت قد قمت سابقاً بإنشاء حساب وتسجيله في تطبيق Eversense للجهاز المحمول، فهذا يعني أن لديك بالفعل حساب Eversense DMS، ولا تحتاج إلى إنشاء حساب جديد وتسجيله. انتقل إلى الصفحة التالية لمعرفة خطوات تسجيل الدخول إلى حسابك.

1. انتقل إلى global.eversensedms.com

2. انقر على "Sign Up"

3. أدخل المعلومات المطلوبة

4. انقر فوق "Submit"

ملاحظة: سيُطلب منك تعيين سؤال سري لتحقيق أمان إضافي بعد تسجيل دخولك للمرة الأولى. يمكنك الآن استخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور كبيانات تسجيل الدخول لحساب Eversense DMS لديك ولجميع منتجات Eversense الأخرى.

تسجيل الدخول

عليك تسجيل الدخول في كل مرة تحتاج فيها إلى الوصول إلى Eversense DMS.

1. انتقل إلى global.eversensedms.com

2. في صفحة Sign In، أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور تذكر أن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك سيكونان نفس اللذين استخدمتهما لتسجيل الدخول إلى تطبيق Eversense للجهاز المحمول.

3. انقر على "Sign In"

ملاحظة مهمة: في حال أجريت أكثر من ثلاث محاولات غير ناجحة لتسجيل الدخول، سيصبح حساب Eversense DMS مقفلاً لمدة 10 دقيقة.

ملاحظة: إذا كنت غير نشط على موقع DMS لمدة 25 دقيقة تقريباً، فستلقى رسالة منبئة ترشدك لاختيار "Continue" في حال رغبت بالبقاء مسجلاً.

Session Expiration Warning ✕


Your session is about to expire!

04:40 seconds left

Click Continue to keep working with your session or Logout to exit immediately.

[Logout](#) [Continue](#)

For the Eversense CGM User


Data Management System

English UK ▼

* Use the same email address and password used to log into the Eversense Mobile App.

Email *

Password *

 👁


* Mandatory field

[Sign In](#)

Need an Account ? [Sign Up](#)
[Forgot your Password?](#)


Problem logging in? [Contact Us](#)

To sign in to Eversense DMS Pro For Healthcare Professionals click [here](#)




هل نسيت كلمة المرور

في حال نسيت كلمة مرور تسجيل الدخول، يمكنك تعيين كلمة مرور جديدة بكل سهولة.

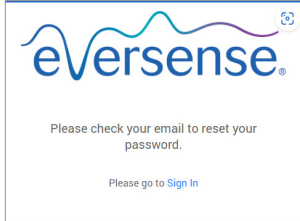

ستظهر لك رسالة تعلمك بوصول بريد إلكتروني إليك يتضمن تعليمات لإعادة تعيين كلمة المرور.

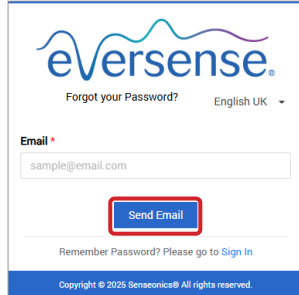


1. انقر فوق "Forgot your password"


على صفحة Sign In

2. أدخل بريدك الإلكتروني عندما يُطلب منك

3. انقر فوق "Send Mail"

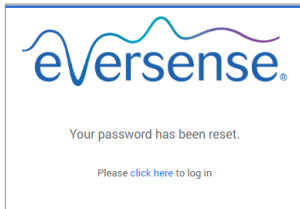

ستظهر لك رسالة، تؤكد إعادة تعيين كلمة المرور لديك. قم باختيار رابط "click here" للرجوع إلى صفحة Sign In.

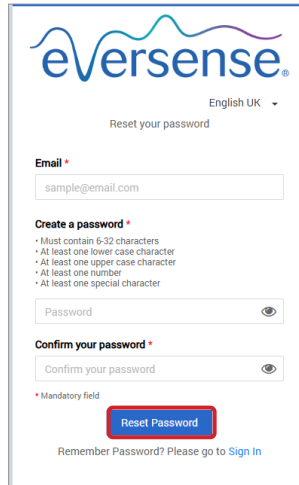

4. افتح البريد الإلكتروني وانقر على

رابط الموقع

سيتم توجيهك إلى صفحة الإنترنت لإنشاء كلمة مرور جديدة وتأكيدها.

5. انقر فوق "Reset Password"

لوحة تحكم Eversense DMS

لوحة التحكم في نظام Eversense DMS عبارة عن الصفحة الافتراضية التي يمكنك رؤيتها كل مرة تسجل الدخول فيها إلى DMS. تحتوي هذه الصفحة على ملفك الشخصي (Profile) وقائمة التنقل ووقت ارتداء Eversense ومعلومات النظام ومحدد نطاق التاريخ وتقرير الملف التعريفي للجلوكوز المتنقل (AGP).

- يمكنك الوصول إلى معلومات الملف الشخصي **Profile** في أعلى يمين الصفحة.
- ويمكنك رؤية قائمة التنقل (**Navigation Menu**) بأعلى يمين الصفحة.

The screenshot shows the Eversense DMS dashboard. The navigation menu on the left is highlighted with a red box. The dashboard header includes the Eversense logo, a menu icon, and the user's name 'jeanarc97@gmail.com'. The main content area displays 'Eversense Wear Time' at 37.5%, a 'Period' of 26-Feb-2025 - 11-Mar-2025, and 'System Information' including Transmitter, Sensor, and Date Sensor Linked. It also shows 'Glucose Settings' with Target, Alert, and Days Since Sensor Linked.

الملف الشخصي (Profile)

تتيح لك ميزة الملف الشخصي (Profile) تغيير كلمة المرور، أو تعديل ملف المستخدم الشخصي، أو تسجيل الخروج من برنامج Eversense DMS.

في حال رغبت بتغيير كلمة مرور تسجيل الدخول، يمكنك إعادة تعيين كلمة مرور جديدة بكل سهولة.

لتغيير كلمة المرور:

1. انقر على اسم المستخدم

ستظهر قائمة منسدلة تعرض صورة ملفك الشخصي، وأحدث تسجيل دخول لك، وخيارات لعرض/تعديل ملفك الشخصي أو تسجيل الخروج.

2. انقر فوق "Profile" للوصول إلى إعدادات الملف الشخصي للمستخدم




3. انقر فوق "Change Password" لعرض

كلمة المرور الحالية وتغييرها

4. أدخل كلمة المرور الحالية

5. أدخل كلمة المرور الجديدة وأكدها

6. انقر فوق "Change Password" لحفظ التغييرات

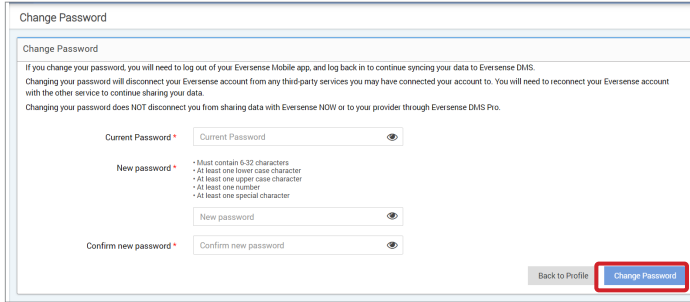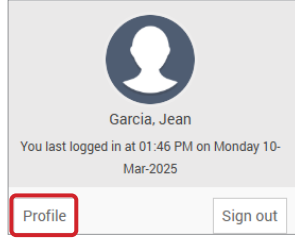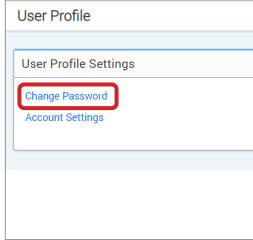

ملاحظة مهمة: بعد تغيير كلمة المرور في DMS، سيتعين عليك تسجيل الخروج من تطبيق Eversense للجهاز المحمول وتسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام كلمة المرور الجديدة.

لتعديل ملفك الشخصي:


1. انقر فوق "Account Settings"

2. أدخل المعلومات التي ترغب بتغييرها

يمكنك تغيير صورة ملفك الشخصي من خلال الضغط على زر "اختيار ملف (Choose file)"، واختيار صورة من ملفات حاسوبك. سيتم تغيير صورة الملف الشخصي لجميع منتجات Eversense المتوافقة.

Account Settings

Profile Details



Profile Picture **Choose File** No file chosen

First Name *

Last Name *

Mobile Number *

Date Of Birth *

Gender *

Diabetes Type

Secret Question *

Answer *

Show Answer

3. انقر فوق "Save" لحفظ التغييرات



ستظهر صفحة إعدادات ملف المستخدم الشخصي مرةً أخرى. للرجوع إلى لوحة التحكم، انقر على "Dashboard" بأعلى يسار قائمة التنقل.

قائمة التنقل

قائمة التنقل موجودة بالجانب الأيسر العلوي من لوحة تحكم AGP. يمكنك فتح قائمة التنقل وغلاقها من خلال النقر على . انقر على أي زر بالقائمة للانتقال إلى ذلك الاختيار.

ملاحظة: ويمكنك تحديد لغتك المفضلة من خلال النقر فوق اللغة.

يمكنك النقر فوق أيقونة < لتوسعة الاختيار في قائمة التنقل.

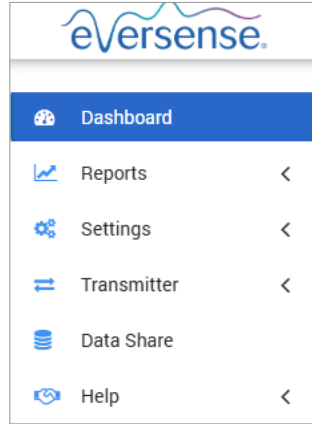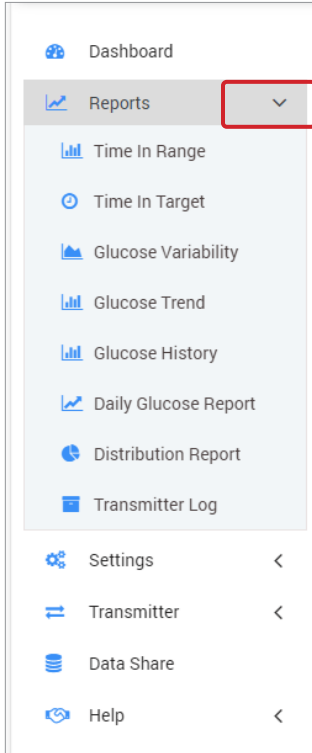

الميزات	خيارات القائمة
الرجوع إلى لوحة التحكم	Dashboard
عرض التقارير، وطباعتها، ومشاركتها	Reports
• الوقت في الهدف	
• الوقت في النطاق	
• تغيير الجلوكوز	
• اتجاه الجلوكوز	
• تاريخ الجلوكوز	
• تقرير الجلوكوز اليومي	
• تقرير التوزيع	الإعدادات
• سجل جهاز الإرسال	
Eversense DMS إعدادات	
• الجلوكوز	جهاز الإرسال
• تقرير تلخيصي	
تطبيق Download Client	Data Share
رابط حساب DMS → Clinic DMS Pro	Help
• معلومات تعريفية	
• تواصل معنا	
• تعطيل الحساب	
• ملاحظات الإصدار	

إعداد نطاق التاريخ

بأعلى لوحة التحكم، ستجد خياراتك لنطاق التاريخ المحدد سلفاً، إضافة إلى خيار تعيين نطاق التاريخ المخصص لك. سيؤثر هذا على اختيار البيانات المستخدمة للتحليلات وطريقة عرضها في لوحة تحكم AGP وجميع التقارير.



لضبط إعدادات نطاق التاريخ:

1. إذا رغبت في رؤية بيانات ليست ضمن أحد نطاقات التواريخ المحددة سلفاً، فانقر على الزر المسمى "Custom Range" لعرض قائمة التقييم المنسدة



سيعرض هذا رسالة منبثقة تسمح لك بتحديد نطاق التاريخ المخصص.

ملاحظة: يمكن الوصول إلى البيانات من خلال DMS حتى عام واحد سابق.

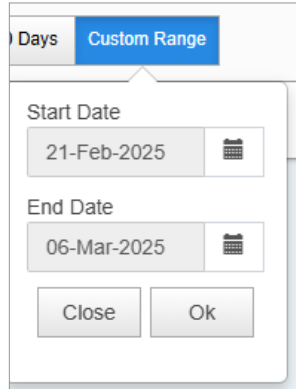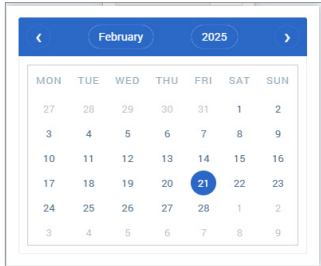

2. حدد **Start Date** للتقرير المطلوب


3. حدد **End Date** للتقرير المطلوب

4. انقر فوق "Ok" عند الانتهاء

وقت ارتداء Eversense ومعلومات النظام

وقت ارتداء Eversense

وقت ارتداء Eversense، هو النسبة المئوية للوقت الذي جرى فيه ارتداء جهاز الإرسال الذكي، على مدى نطاق التاريخ الذي حددته. نسبة 100% تساوي 23.5 ساعة من وقت ارتداء جهاز الإرسال الذكي اليومي. لا تشمل النسبة المئوية الأوقات التي لا يُعرض فيها الجلوكوز. على سبيل المثال، بداية مرحلة التهيئة أو عند تنشيط المنبه، والذي يحد من عرض الجلوكوز.

 Eversense Wear Time
21.3 %

معلومات النظام: يقع قسم معلومات النظام أعلى لوحة تحكم AGP.


هذا القسم يوضح:

- Transmitter Serial Number
- Sensor Serial Number
- إعدادات الجلوكوز: يمكن تغيير إعدادات الجلوكوز في DMS وكذلك في تطبيق Eversense للجهاز المحمول (راجع Settings للحصول على مزيد من المعلومات).
- تاريخ ربط المستشعر
- عدد الأيام منذ ربط المستشعر

System Information		Glucose Settings		
Transmitter: 701048	Target	Low: 70 mg/dL	High: 180 mg/dL	
Sensor: 7600000000000079	Alert	Low: 65 mg/dL	High: 250 mg/dL	
Date Sensor Linked: 07-Aug-2024		Days Since Sensor Linked: 215		

الملف التعريفي للجلوكوز المتنقل في DMS


التقرير الأساسي للوحة التحكم في نظام Eversense DMS، عبارة عن تقرير AGP (الملف التعريفي للجلوكوز المتنقل) الذي يعرض بيانات الجلوكوز في 3 أقسام.

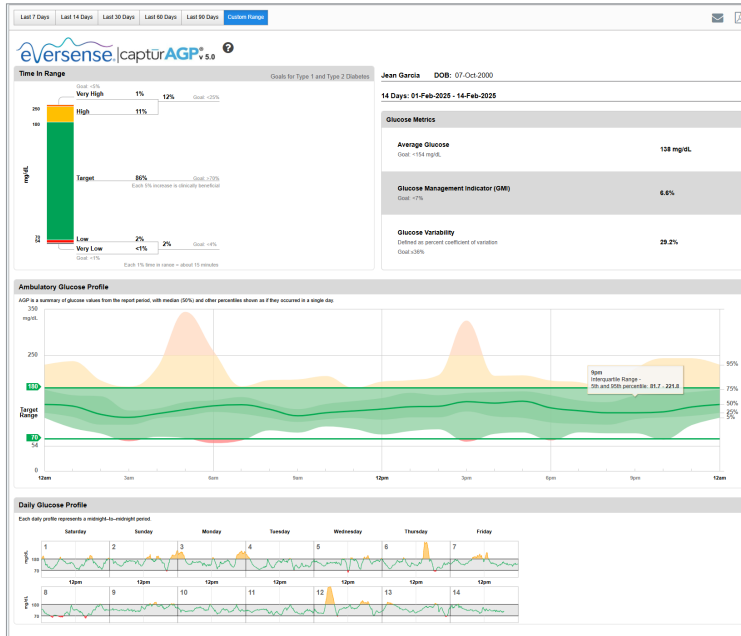

القسم 1: إحصائيات وأهداف الجلوكوز

نطاقات وأهداف الجلوكوز: يعرض هذا الجدول قيمك المحسوبة ضمن كل نطاق جلوكوز كنسبة مئوية من قراءات الجهاز على مدار يوم مكون من 24 ساعة. يمكن تحويل النسب المئوية إلى دقائق/ساعات بحيث يساوي كل 1% من الوقت في النطاق حوالي 15 دقيقة.

- الوقت في الهدف: ومن الناحية المثالية، تكون قيم الجلوكوز في النطاق المستهدف
- منخفضة/منخفضة جدًا: الغرض - عدد قليل من القيم المنخفضة أو المنخفضة جدًا، تقليل القيم المنخفضة يجعلك تشعر بتحسن
- مرتفعة/مرتفعة جدًا: الغرض - عدد قليل من القيم المرتفعة أو المرتفعة جدًا، التقليل من القيم المرتفعة من شأنه خفض نتائج اختبار A1c بمرور الوقت
- عدد الأيام في التقرير والتاريخ: يتم تعيين إعدادات الافتراضية على آخر 14 يومًا، ولكن يمكن تحديد نطاق تاريخ مخصص (راجع تعيين نطاق التاريخ الوارد سابقًا في هذا القسم).
- متوسط الجلوكوز (المتوسط): يتم جمع جميع قيم الجلوكوز معًا، ثم قسمتها على عدد القراءات
- GMI (مؤشر إدارة الجلوكوز): يتم حسابه من متوسط مستوى الجلوكوز؛ ويقدر بالتقريب مستوى نتائج اختبار A1c المستقبلي الخاص بك.
- تغيير الجلوكوز: مدى التباعد (الاتساع) بين أعلى وأدنى قيم للجلوكوز؛ من الناحية المثالية، الرقم المنخفض يكون أقل من أو يساوي 36% [معامل الاختلاف النسبي].

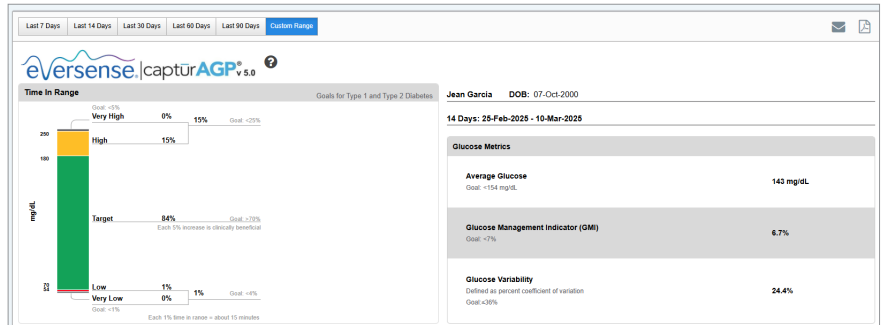


المصدر: <http://www.agpreport.org/agp/agpreports>

القسم 2: الملف التعريفي للجلوكوز المتنقل: تُدمج كل ملفات تعريف قيم الجلوكوز من نطاق التاريخ المحدد لتكون صورة تعبر عن يوم واحد (24 ساعة). ومن الناحية المثالية، تظل الخطوط داخل المنطقة المحددة باللون الأخضر (النطاق المستهدف).


الخط الثقيل: خط الوسيط (الأوسط) حيث تكون نصف قيم الجلوكوز بالأعلى، ونصفها الآخر بالأسفل، من الناحية المثالية، يكون اللون البرتقالي مستويًا في الغالب وداخل منطقة النطاق الأخضر المستهدف من 70 إلى 180 mg/dL.

التظليل الأعمق: تُظهر المنطقة المظلمة بلون أعمق 50% من قيم الجلوكوز، من الناحية المثالية، تكون المسافات متقاربة

التظليل الأفتح: تكون 5% من القيم بالأعلى (95% ضمن الخط العلوي)، و5% من القيم بالأسفل (5% ضمن الخط السفلي)، من الناحية المثالي، كلما اقتربت المنطقة المظلمة بلون فاتح إلى المنطقة المظلمة بلون أعمق، كان ذلك أفضل

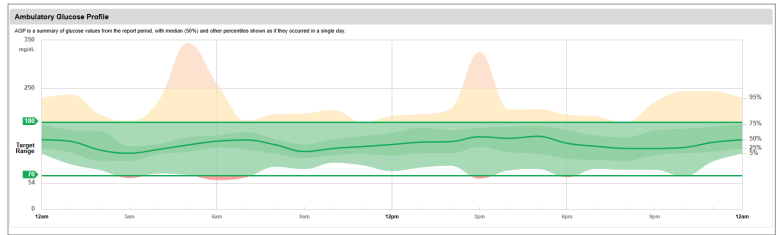

القسم 3: ملفات تعريف القيم اليومية للجلوكوز: يعبر كل مربع عن نمط الجلوكوز ليوم واحد. سيتم عرضها فقط إذا تم تعيين نطاق التاريخ على 14 يوماً أو أقل.

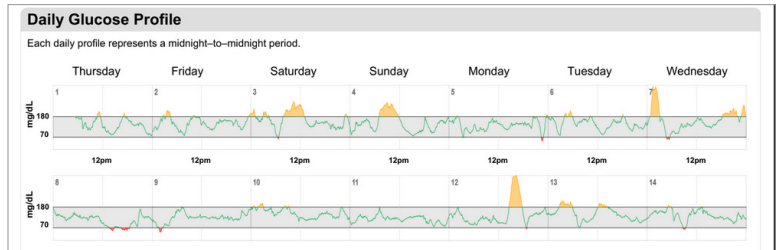

المصدر: <http://www.agpreport.org/agp/agpreports>




التقارير الإضافية

تتمثل إحدى ميزات تطبيق Eversense DMS الأساسية في القدرة على إنشاء التقارير المفصلة عن ذاكرة فحوصات الجلوكوز لديك، وطباعتها، ومشاركتها. تقدم التقارير طرقًا متنوعة لتنظيم وتصوير قراءات الجلوكوز لديك من لحظة لأخرى، ومن يوم لآخر، أو على مدار عدة أسابيع أو أشهر.

ملاحظة: إذا اخترت تقريراً ولم تُعرض أي بيانات، فتأكد من تحميل بيانات الجلوكوز سلفاً لنطاق التاريخ المحدد. إذا ظلت البيانات غير معروضة، تواصل مع دعم العملاء.

تصفية ما يُعرض بالتقارير، وطباعتها، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني

ستجد، في أعلى يمين صفحات التقرير، خيارات حول تغيير تفضيلات التقارير، وطباعة التقرير، وإرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني.


	انقر		من أجل
 <p>حفظ التقرير بتنسيق PDF</p>	 <p>إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني</p>	 <p>تغيير عوامل تصفية التقرير</p>	<p>الطريقة</p>
<p>انقر على الأيقونة لتحويل تقريرك إلى تنسيق PDF الذي يتيح لك طباعة التقرير في المنزل.</p>	<p>اتبع الشاشة المنبثقة التي تطالبك بإرسال التقرير القابل للطباعة عبر البريد الإلكتروني لمستلم محدد.</p> <div data-bbox="341 621 663 856" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Send Report to Email ✕</p> <p>To: <input type="text"/></p> <p>Subject: <input type="text"/></p> <p>Glucose Variability for Jean Garcia from 09-Feb-2025 to 10-Mar-2025</p> <p>Attached: GlucoseVariability.pdf</p> <p>Message: <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Send"/></p> </div>	<p>قم بعمل اختيارات لاختيار أنواع الأحداث، وأيام الأسبوع، وخيارات أخرى ستظهر في التقارير، عندما يتوفر ذلك. عامل التصفية هذا غير متوفر في تقارير AGP، أو الوقت في النطاق من خلال الوقت من اليوم، أو الوقت في الهدف أو الجلوكوز اليومي.</p> <div data-bbox="747 722 1069 935" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Report Preferences ✕</p> <p>Event Types: <input type="button" value="Event Types"/> Days of the Week: <input type="button" value="Days of the Week"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sensor Glucose</p> <p><input type="checkbox"/> Blood Glucose</p> <p><input type="checkbox"/> Insulin</p> <p><input type="checkbox"/> Meal</p> <p><input type="checkbox"/> Exercise</p> <p><input type="checkbox"/> Health</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Save"/></p> </div>	

الوقت في الهدف

يعرض تقرير الوقت في الهدف (Time In Target) مخططاً دائرياً يحلل النسبة المئوية للوقت الذي يكون به الجلوكوز أقل من النطاق المستهدف الذي حددته في إعدادات الجلوكوز، أو يكون ضمنه، أو أعلى منه.

عرض التقرير:

- يمثل الشكل الإسفيني باللون الأخضر النسبة المئوية للوقت الذي قضيته ضمن النطاق المستهدف.
- يمثل الشكل الإسفيني باللون الرمادي النسبة المئوية للوقت الذي قضيته أعلى من النطاق المستهدف.
- يمثل الشكل الإسفيني باللون الأحمر النسبة المئوية للوقت الذي قضيته أقل من النطاق المستهدف.

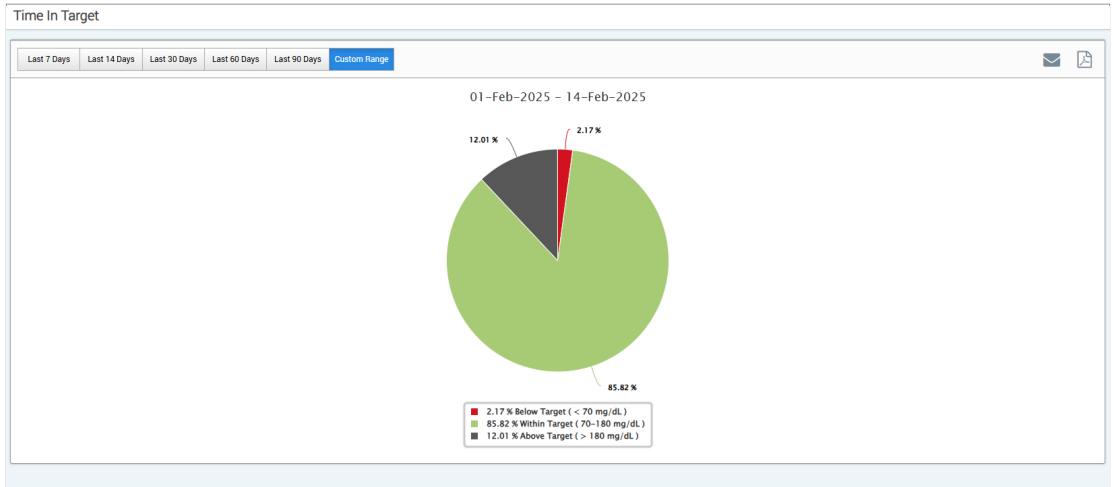

الوقت في النطاق

الوقت في النطاق من خلال الوقت من اليوم


يعرض تقرير الوقت في النطاق من خلال الوقت من اليوم مجموعة من المخططات والتي تُحلل النسبة المئوية للوقت الذي يكون فيه الجلوكوز ضمن نطاقات الجلوكوز المعدة مسبقًا.

- منخفض جدًا: < 54 mg/dL
- منخفض: 54 - 70 mg/dL
- ضمن النطاق: 70 - 180 mg/dL
- مرتفع: 180 - 250 mg/dL
- مرتفع جدًا: > 250 mg/dL

يوجد قسمان لهذا التقرير:

الوقت في النطاق


يعرض ذلك النسبة المئوية الإجمالية للوقت المستغرق في نطاقات الجلوكوز المعدة مسبقًا، بناءً على نطاق الوقت الذي حدده.

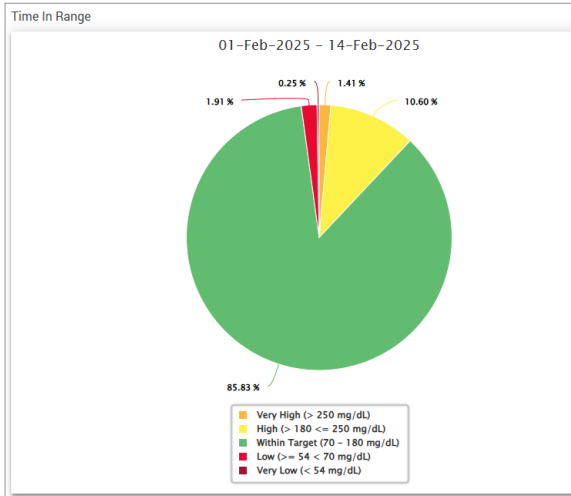

الوقت في النطاق من خلال الوقت من اليوم

يقسم هذا القسم من التقرير الإجمالي في مخطط النطاق إلى شرائح زمنية مختلفة من اليوم. يمكنك عرض بياناتك عبر شرائح مكونة من 4 ساعات، أو 6 ساعات، أو 8 ساعات. يتم ضبط ذلك من خلال تحديد الخيار في الجزء العلوي الأيمن من التقرير.

تعرض كل شريحة نسبة مئوية من الوقت الذي كان الجلوكوز فيه ضمن تلك الشرائح التي تتكون من "منخفض جدًا" أو "منخفض"، أو "ضمن النطاق"، أو "مرتفع جدًا".

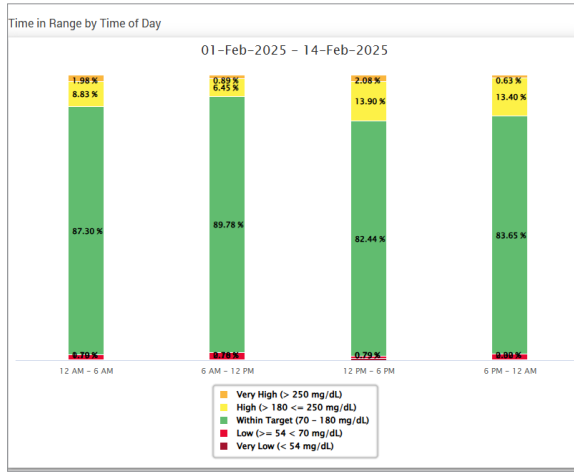


تقرير تباين قيم الجلوكوز

يعرض تقرير تباين قيم الجلوكوز المعلومات بطريقتين:

الرسم البياني لاتجاه الجلوكوز:

- يعرض ملخص قراءات الجلوكوز على مدار 24 ساعة.
- يتضمن أياماً متعددة للبيانات المضافة ضمن نفس الرسم البياني.
- يظهر أقصى وأدنى قراءة للجلوكوز وقراءة الجلوكوز المتوسطة لكل ساعة.
- يقدم صورة مرئية للتغيرات اليومية بمستويات الجلوكوز.

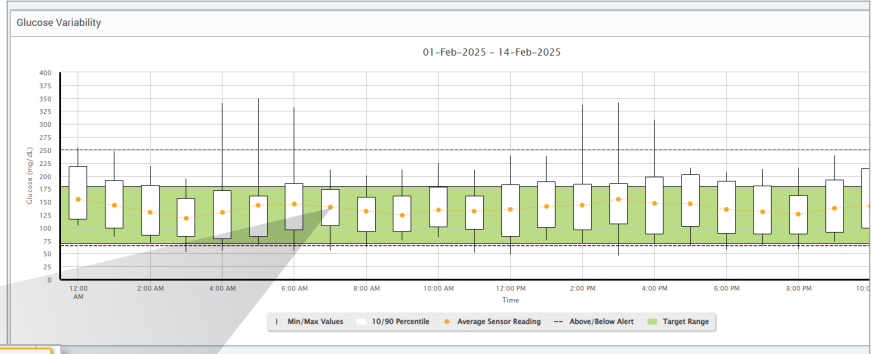

From 07:00 AM to 08:00 AM
Average: 134 mg/dL
Min: 73 mg/dL
Max: 226 mg/dL
10th Percentile: 89 mg/dL
90th Percentile: 179 mg/dL

ملاحظة: ضع المؤشر فوق قراءة المستشعر المتوسطة المعينة لعرض تفاصيل عن القراءات خلال الساعة.

الجدول:

• ينظم بيانات الجلوكوز وفقًا لمدة زمنية من 4 ساعات.

• يقدم تحليلًا إحصائيًا مفصلاً لكل فترة.

• يشمل النسبة المئوية للقرارات المضمنة بنطاق هدف الجلوكوز وأعلى وأدناه.

• يقدم توزيع استخدام الأنسولين والكريوهيدرات المدخلة لنفس الفترات الزمنية.

Glucose							
GLUCOSE	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-00:00	TOTAL
% Below Low Alert	1%	2%	1%	2%	2%	1%	1%
% Above High Alert	3%	-	1%	2%	2%	-	1%
Number of Values Below Low Alert	8	10	6	11	10	5	56
Number of Values Above High Alert	27	-	8	12	15	-	65
% Within Target	81%	86%	81%	89%	88%	90%	86%
% Below Target	2%	2%	1%	2%	3%	1%	2%
% Above Target	17%	12%	18%	9%	8%	9%	12%
Average Glucose	149 mg/dL	138 mg/dL	147 mg/dL	130 mg/dL	138 mg/dL	134 mg/dL	139 mg/dL
Lowest Glucose	46 mg/dL	57 mg/dL	60 mg/dL	53 mg/dL	56 mg/dL	48 mg/dL	49 mg/dL
Highest Glucose	342 mg/dL	226 mg/dL	281 mg/dL	346 mg/dL	350 mg/dL	240 mg/dL	350 mg/dL
Standard Deviation	46.4 mg/dL	35.8 mg/dL	40.9 mg/dL	41.9 mg/dL	39.8 mg/dL	32.9 mg/dL	40.4 mg/dL
Number of Values in the 10-90 Percentile	504	527	539	545	540	545	3,169
Total Number of Glucose Values	624	664	672	672	672	672	3,966
Number of Days with at least One Value	13	14	14	14	14	14	14
Average Number of Values per Day	48	47	48	48	48	48	283

ملاحظة: في حال واجهت مشكلة في عرض التقرير، جَرِّب تحديد نطاق تاريخك. عادةً ما لا يتيح لك مقدار البيانات الكبير عمل التقرير.

عرض التقرير

1. حدد Reports > Glucose Variability

سيكون نطاق التاريخ المعروف هو آخر أسبوع من البيانات المدخلة أو التي تم تحميلها.

2. حدد نطاق التاريخ

ملاحظة: لتغيير التاريخ للتقرير، اتبع تعليمات إعداد نطاق التاريخ السابقة في قسم Dashboard بدليل المستخدم.

تقرير اتجاه الجلوكوز

تقرير اتجاه الجلوكوز:

- يعرض قراءات الجلوكوز الفردية على مدار 24 ساعة.
- يعرض أياماً متعددة للبيانات المضافة بنفس الرسم البياني.
- يقدم طريقة سهلة لتحديد التباين بين أيام الأسبوع.


عرض التقرير

1. حدد **Reports > Glucose Trend**

2. حدد نطاق التاريخ

عرض التقرير

نقاط البيانات بالتقرير ذات ترميز لوني بحيث تُعرض بلون مختلف مع كل يوم من أيام الأسبوع. يمكنك استخدام عامل تصفية التقرير، لاختيار اليوم/الأيام التي تود عرضها بالرسم البياني.

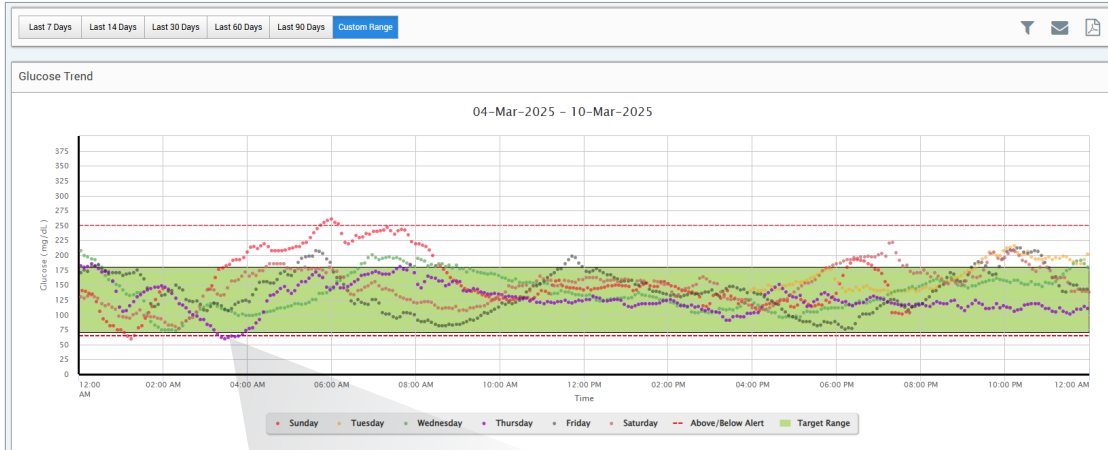

ملاحظة: ضع المؤشر فوق قراءة معينة لمستشعر الجلوكوز لعرض التفاصيل عن تلك القراءة.

تقرير تاريخ الجلوكوز

يعرض تقرير ذاكرة فحوصات الجلوكوز بيانات نظام CGM المؤرخة، بالإضافة إلى البيانات المدخلة يدويًا في شكل رسم بياني للاتجاه. يقدم تقرير ذاكرة فحوصات الجلوكوز طريقة فعالة لتعقب قراءات ومعايير مستشعر الجلوكوز.


عرض التقرير

1. قم باختيار **Reports > Glucose History Report**

2. حدد نطاق التاريخ

عرض التقرير

كل نقطة بيانات هي عبارة عن قراءة الجلوكوز بالمستشعر. تُعرض الأحداث المسجلة بتطبيق الجهاز المحمول بالتقرير في وقت تسجيلها. في حال حددت نطاق تاريخ لأكثر من 30 يوماً، لن تُعرض أحداث مثل الوجبات، والأنسولين، وما إلى ذلك.

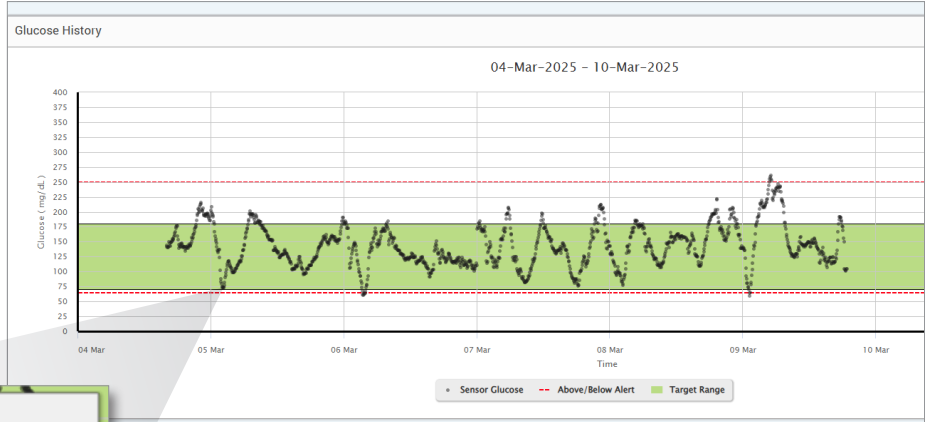

Sensor Glucose
74 mg/dL
05-Mar-2025 02:12:32 AM

ملاحظة: ضع المؤشر فوق قراءة معينة لمستشعر الجلوكوز لعرض التفاصيل عن تلك القراءة. كما يمكنك أن تضع المؤشر فوق أيقونة حدث لعرض تفاصيل عن ذلك الحدث.

تقرير الجلوكوز اليومي

يعرض تقرير الجلوكوز اليومي قراءات الجلوكوز طوال 24 ساعة وعلى مدار عدة أيام متتالية.

تقرير الجلوكوز اليومي:

- يحتوي على نطاق مستهدف ثابت لمستوى الجلوكوز يتراوح بين 70-180 mg/dL.
- يعرض مستويات تنبيه الجلوكوز المرتفع والمنخفض (الخطوط الحمراء) التي قمت بتعيينها في نظام CGM.
- يعرض الإحصائيات الرئيسية لكل يوم استنادًا إلى مستويات الجلوكوز المستهدفة وإعدادات التنبيه.
- يتضمن خيارًا لعرض أيقونات الأحداث على الرسم البياني للاتجاه، وتوسيع جدول الأحداث لكل يوم.

عرض التقرير

1. حدّد Reports > Daily Glucose Reports

2. حدد نطاق التاريخ

عرض التقرير

يعرض تقرير الجلوكوز اليومي عدة أيام بالتتابع لنطاق التاريخ المحدد، ويوفر طريقة لتحديد أنماط الجلوكوز في عدة أيام. تظهر الإحصائيات الخاصة بكل يوم على يمين الرسم البياني للاتجاه وتستند إلى نطاق الجلوكوز القياسي المستهدف الذي يتراوح بين 70-180 mg/dL ومستويات تنبيه الجلوكوز المرتفع التي حددها. لمراجعة معلومات CGM الإضافية لكل يوم (التنبهات والمعايير والأحداث التي أدخلتها في تطبيق CGM)، يمكنك تشغيل عرض أيقونات الأحداث على الرسم البياني للاتجاه وتوسيع جدول الأحداث أسفل الرسم البياني للاتجاه لعرض المزيد من المعلومات. عند توسيع جدول الأحداث، يسرد الجدول المعلومات بزيادات مدتها 4 ساعات تتوافق مع أجزاء الأربع ساعات في الرسم البياني للاتجاه.



ملاحظة: عند تسجيل أحداث متعددة في خلية واحدة في جدول الأحداث، سيؤدي التمرير فوق الخلية إلى عرض المزيد من المعلومات.

تقرير توزيع الجلوكوز

تقرير توزيع الجلوكوز:

- ينظم بيانات الجلوكوز لديك وفقاً لأهداف الجلوكوز ونطاقات التنبيه ويعرض البيانات في مخطط دائري.
- يعرض مخططات دائرية منفصلة للفترات الحالية والسابقة.
- يتم ضبط النطاق المستهدف ضمن Glucose Settings.
- يُقدّم فحصٌ بصريٌّ لعدد القراءات ضمن الهدف خلال النطاق المختار المحدد سلفاً والتغير على مدار اليوم.


عرض التقرير

1. قم باختيار **Reports > Glucose Distribution Report**

2. حدد نطاق التاريخ

عرض التقرير

سيعرض تقرير توزيع الجلوكوز مخططين دائريين مستندًا إلى نطاق التاريخ المحدد سلفًا والذي اخترته. وسيعرض مجموعة البيانات الحالية والسابقة لنطاق التاريخ المحدد. تتيح لك هذه البيانات مشاهدة مقارنة بين التغييرات الحالية والسابقة ضمن إدارتك.

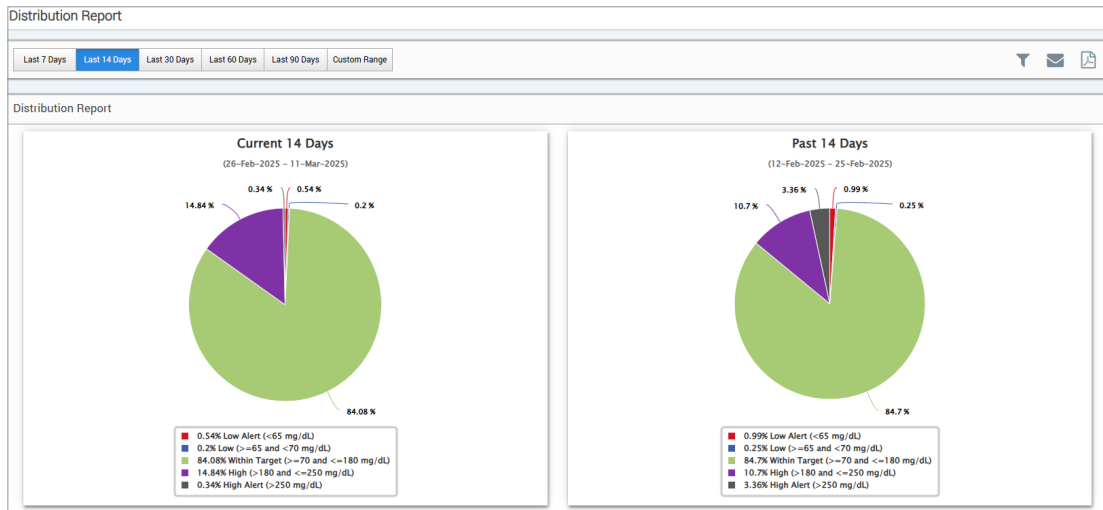

تقرير سجل جهاز الإرسال

يقدم تقرير سجل جهاز الإرسال استعراض بيانات شامل على مدار نطاق التاريخ المحدد.

يعرض تقرير سجل جهاز الإرسال ثلاثة جداول منفصلة:

- **جلوكوز الدم:** يعرض هذا قائمة بكافة قيم جلوكوز الدم المدخلة يدويًا والأحداث ذات الصلة حسب تسلسل زمني.
- **مدخلات الأحداث:** وهذا يعرض أحداث المريض المخلة عبر تطبيق جوال Eversense Mobile App.
- **الجلوكوز من المستشعر:** يعرض هذا قيم الجلوكوز المرصودة بالمستشعر.

عرض التقرير

1. حدد Reports > Transmitter Log

2. حدد نطاق التاريخ

عرض التقرير

تُعرض الأحداث مع معلومات متعلقة بالتاريخ، والوقت، إضافة إلى:

- **جلوكوز الدم:** قيمة الجلوكوز، والوحدة والمعايرة
- **مدخلات الأحداث:** نوع الحدث، والنوع الفرعي للحدث، والقيمة
- **الجلوكوز من المستشعر:** قيمة الجلوكوز، والوحدة، ومعرّف المستشعر

يمكن فرز الأحداث بترتيب تصاعدي أو تنازلي من خلال النقر على رأس العمود. يُشار إلى عدد التسجيلات بأسفل كل سجل.

DATE	TIME	BLOOD GLUCOSE	UNIT	CALIBRATION
04-Jun-2024	04:25 PM	100	mg/dL	🔴
04-Jun-2024	02:07 PM	100	mg/dL	🔴
03-Jun-2024	12:51 PM	160	mg/dL	🔴
03-Jun-2024	12:41 PM	166	mg/dL	⬛
03-Jun-2024	11:33 AM	100	mg/dL	🔴
31-May-2024	01:41 PM	99	mg/dL	🔴
31-May-2024	12:42 AM	100	mg/dL	🔵
31-May-2024	12:35 AM	112	mg/dL	🔴
30-May-2024	11:30 PM	124	mg/dL	🔴
30-May-2024	10:13 PM	100	mg/dL	🔴

سيتشير الرمز الموجود أسفل عمود "Calibration" في جدول جلوكوز الدم إلى ما إذا كانت قيمة الجلوكوز مستخدمة للمعايرة، أو غير مستخدمة، أو يدوية.

- **Used:** قيمة جلوكوز الدم التي أدخلتها كمعايرة ومقبولة من النظام. 🔴
- **Not used:** المعايرة التي تدخلها، وتكون قيمتها أعلى من 400 mg/dL أو أقل من 40 mg/dL. ⬛
- **Manual:** لم يتم إدخال حدث جلوكوز الدم كمعايرة. 🔵

سيظهر اختيار "Device History" وقت إدخال المستشعر، بالإضافة إلى تاريخ بدء المعايرة.

تصدير البيانات

ومن صفحة تقرير سجل جهاز الإرسال، يمكنك أيضًا تصدير البيانات بتنسيق .xlsx.

1. حدد Reports > Transmitter Log

2. حدد "Export all" من أعلى الصفحة لتصدير

كافة بيانات سجل جهاز الإرسال بتنسيق .xlsx (جدول بيانات Excel)

Transmitter Log

Last 7 Days Last 14 Days Last 30 Days **Last 60 Days** Last 90 Days Custom Range

Device History Export all

الإعدادات

الجلوكوز

تسمح لك إعدادات الجلوكوز أن تلائم بشكل شخصي هدف الجلوكوز ومستويات التنبيهات. يؤثر هذا الإعداد على كيفية تنظيم وعرض الجلوكوز وبيانات الحدث الأخرى في التقارير. عندما تقوم بمزامنة بياناتك لاسلكيًا عبر ميزة مشاركة بياناتي (Share My Data) بتطبيق الجهاز المحمول، فستجري أيضًا مزامنة إعدادات الجلوكوز التي حفظتها بالتطبيق مع حساب DMS الخاص بك.

ملاحظة:

- لا تتم مزامنة إعدادات الجلوكوز عند تحميل البيانات من جهاز الإرسال الذكي عبر كابل USB، من خلال تطبيق Eversense Client.
- إن تغيير الإعدادات في نظام إدارة البيانات (DMS) لن يغير الإعدادات التي كنت قد أدخلتها بتطبيق Eversense للجهاز المحمول. لا يمكنك تغيير الإعدادات لنظام Eversense CGM مباشرةً إلا على تطبيق Eversense CGM للجهاز المحمول.

Glucose Settings

Unit Of Measure mg/dL mmol/L

Target Range (must be between Alert Settings)

High Target*	-	180	+
Low Target*	-	70	+

Alert Range (must be between 55 and 350 mg/dL)

High Alert*	-	250	+
Low Alert*	-	64	+

Note:
Eversense E3: Low Alert can be set as low as 60 mg/dL
Eversense 365: Low Alert can be set as low as 55 mg/dL

Cancel Save

لتغيير الإعدادات في حساب Eversense DMS، اتبع الخطوات أدناه:

1. **Settings > Glucose** حدد
 2. انقر على زر **mg/dL** أو **mmol/L** أسفل وحدات القياس لتحديد وحدة القياس المطلوبة لعرض بيانات الجلوكوز إذا غيرت وحدة القياس، فستتغير قيم نطاق الجلوكوز ونطاق التنبيه تبعاً.
 3. انقر على زر **+/-** على يمين **High Target** (الهدف المرتفع) و**Low Target** (الهدف المنخفض) لعرض وضبط الحدود المرتفعة والمنخفضة لنطاق الجلوكوز المستهدف
 4. كرر الإجراء لنطاق تنبيه الجلوكوز
 5. عندما تنتهي من إجراء التغييرات، انقر فوق **“Save”** لحفظ تغييراتك
- ملاحظة:** لا تؤثر إعدادات Eversense DMS على إعدادات نظام Eversense CGM ولا تؤثر إلا على طريقة تنظيم البيانات وعرضها بشاشة Eversense DMS.

تقرير تلخيصي

نتيح لك إعدادات Report Summary إعداد تقرير تلقائي مجدول بانتظام، ليتم إرساله عبر البريد الإلكتروني إليك. يمكنك تحديد عدد المرات التي تتلقى فيها التقارير، وما التقارير التي تود تلقيها.

ملاحظة:

- ستتلقى التقارير بتنسيق PDF وتكون مرفقة بالبريد الإلكتروني.
- سيتم إرسال البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المُستخدم لإنشاء حساب Eversense.

Schedule Details

Yes, I would like to receive reports

Report Occurrence Once a Week Every Other Week Once a Month

Preferred Language

Select report to print AGP Report
 Time In Range
 Time In Target
 Distribution Report
 Glucose Trend
 Glucose Variability
 Glucose History

Time in Range by Time of Day 4 hours 6 hours 8 hours

لتغيير الإعدادات في حساب Eversense DMS، اتبع الخطوات أدناه:

1. حدد Settings > Report Summary

2. انقر فوق المربع بجوار "Yes, I would like to receive reports" بحيث يتم عرض علامة الاختيار

3. اختر عدد المرات التي ترغب فيها بتلقي التقرير على البريد الإلكتروني الخاص بك

• مرة في الأسبوع: ستتلقى التقرير كل يوم أحد. ستعرض التقارير البيانات التي تم حسابها عبر نظام Eversense CGM خلال الأسبوع السابق.

• مرة كل أسبوعين: ستتلقى التقرير يوم الأحد من كل أسبوعين. ستعرض التقارير البيانات التي تم حسابها عبر نظام Eversense CGM خلال الأسبوعين السابقين.

• مرة في الشهر: ستتلقى التقرير في اليوم الأول من الشهر. ستعرض التقارير البيانات التي تم حسابها عبر نظام Eversense CGM خلال الشهر السابق.

4. حدد اللغة التي ترغب في أن يتم عرض التقارير بها

5. حدد التقارير التي ترغب في تلقيها

ملاحظة:

- إن حددت تقرير "الوقت في النطاق"، فستحتاج كذلك لتحديد إعداد "الوقت من اليوم" كذلك. لمزيد من المعلومات حول تقرير "الوقت في النطاق من خلال الوقت من اليوم"، راجع التقارير.
- تقرير الجلوكوز اليومي ليس خيارًا متاحًا لمخصص التقرير.

6. انقر فوق "Save"

بمجرد حفظ هذا الإعداد، ستتلقى البريد الإلكتروني الأول في اليوم الأول من الدورة التالية. إن حددت "مرة في الأسبوع" أو "مرة كل أسبوعين"، فستتلقى التقرير الأول في يوم الأحد التالي. إن حددت "مرة في الشهر"، فستتلقى التقرير الأول في اليوم الأول من الشهر التالي.

لإيقاف تلقي رسائل البريد الإلكتروني للتقرير التلخيصي:

1. حدد Settings > Report Summary

2. انقر فوق المربع الموجود بجوار "Yes, I would like to receive reports" بحيث لا يتم عرض أي علامة اختيار في المربع

3. انقر فوق "Save" في أسفل الصفحة

ملاحظة: إذا لم تقم بمزامنة أي بيانات مع حساب Eversense الخاص بك من خلال نظام Eversense CGM الخاص بك طوال الفترة الزمنية الكاملة للتقرير، فستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني لإعلامك بأنك لن تتلقى أي رسائل بريد إلكتروني بعد الآن حتى تتم مزامنة البيانات مع حسابك مرة أخرى.

جهاز الإرسال

تحميل بيانات الجهاز

هناك طريقتان يمكنك من خلالها تحميل بيانات الجهاز إلى حساب **Eversense DMS** الخاص بك.

1. إذا قمت بتشغيل **Auto Sync** في تطبيق Eversense، فسيتم تحميل بيانات CGM تلقائيًا كل 5 دقائق على حساب DMS الخاص بك.

نصيحة: يلزمك اتصال لاسلكي بالإنترنت من جهازك المحمول لمزامنة بياناتك عبر تطبيق Eversense للجهاز المحمول.

ملاحظة: يمكنك تحميل البيانات يدويًا من خلال الانتقال إلى **”مشاركة بياناتي (Share My Data)”** في تطبيق Eversense للجهاز المحمول والنقر على **”Start Sync (بدء المزامنة)”** لتحميل بيانات CGM لاسلكيًا إلى حساب DMS.




2. كما يمكنك تحميل بيانات جهاز الإرسال الذكي عبر كابل USB المضمن مع نظام Eversense CGM لديك. لتحميل بيانات

جهاز الإرسال الذكي باستخدام كابل USB، عليك أولاً تنزيل تطبيق عملاء Eversense وتثبيته.

ملاحظة: وخلال عملية التحميل، لن يجمع جهاز الإرسال الذكي لديك أي بيانات من المستشعر.

لتنزيل تطبيق عملاء Eversense وتثبيته:

1. حدد Transmitter من قائمة التنقل

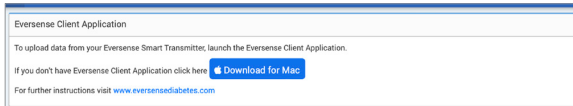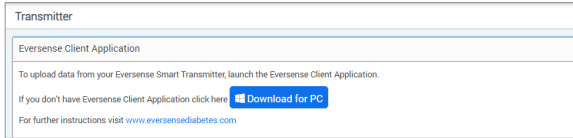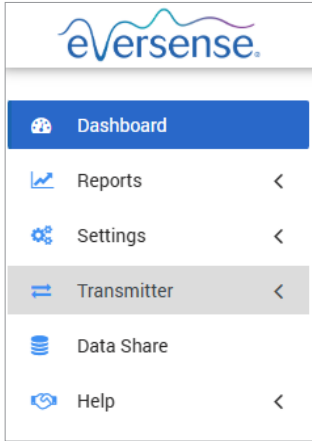

2. انقر فوق Download for PC أو Download for Mac

سيتم عرض الزر الصحيح وفقاً لنظام الكمبيوتر الذي تستخدمه.

ملاحظة: بعد التنزيل الناجح، قد تشاهد تحذيراً من متصفحك يحذر من أن برنامج التثبيت لا يتم تنزيله بصورة شائعة وقد يكون خطراً. لا يحتوي نظام إدارة بيانات (DMS) Eversense على أي برمجيات خبيثة أو فيروسات الحواسيب التي قد تتلف حاسوبك.

لتنزيل تطبيق عملاء Eversense لمستخدمي أجهزة الحاسوب الشخصي:

1. تشغيل برنامج التثبيت

يمكن أن تنقر كذلك على **“Save”** لحفظ البرنامج على الحاسوب المكتبي لديك وتثبيته لاحقاً. عند تشغيل البرنامج، اتبع المطالبات الصادرة عن InstallShield Wizard.

لمستخدمي متصفح Chrome:




لمستخدمي المتصفحات الأخرى:




ملاحظة: يتم تنزيل تطبيق Eversense Client مباشرة عبر نظام Eversense DMS. قد يتم عرض نافذة منبثقة تحريك ما إذا كنت ترغب بتثبيت هذا التطبيق لأنه لم يتم تنزيله من متجر Microsoft. يرجى النقر فوق **“Run Anyway”** لمتابعة التثبيت.


2. انقر على الخيارات الافتراضية لتثبيت البرنامج

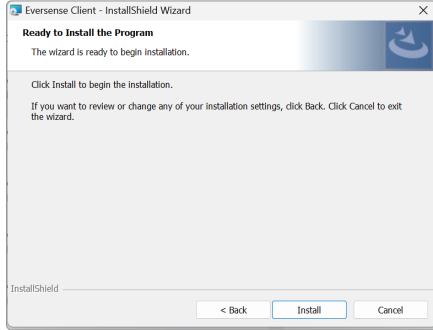


ث.

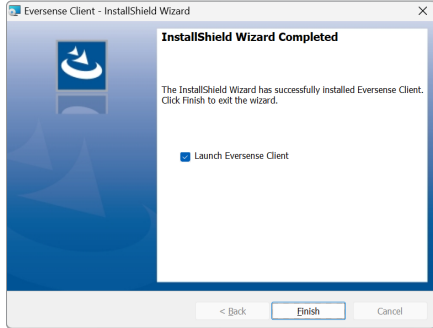


ج.

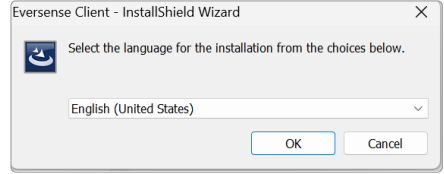

أ.

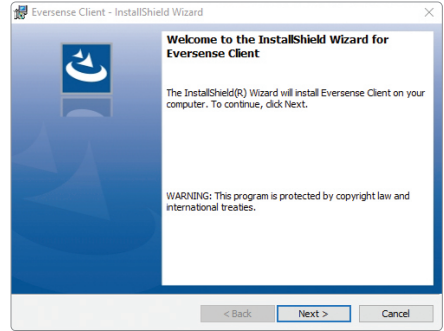

ب.

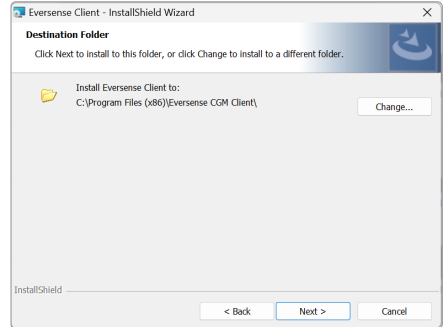


ت.

لتنزيل تطبيق عملاء Eversense لمستخدمي أجهزة Mac:

1. تشغيل برنامج التنصيب

2. قم بسحب أيقونة Eversense Client وإسقاطها في مجلد التطبيق على الشاشة

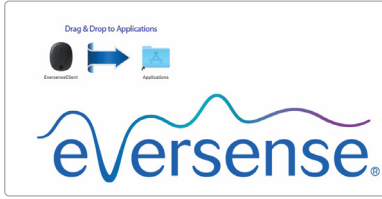

3. افتح تطبيق Eversense Client في مجلد تطبيقات Mac.



ملاحظة مهمة: يتم تنزيل تطبيق EVERSENSE CLIENT مباشرة عبر نظام EVERSENSE DMS. عندما تهم بفتح التطبيق، قد تظهر لك رسالة منبثقة "أجهزة APPLE لا يمكنها فتح هذا التطبيق". لا يحتوي تطبيق EVERSENSE CLIENT على أي برمجيات خبيثة.


لفتح التطبيق، ستحتاج إلى:

1. الانتقال إلى **System Preferences > Security and Privacy**

2. انقر فوق "Open Anyway" بجوار "Eversense Client was blocked from use because it is not from an identified developer"

3. انقر فوق "Open" على الرسالة المنبثقة التالية

لتحميل بيانات جهاز الإرسال الذكي إلى حساب DMS لديك:

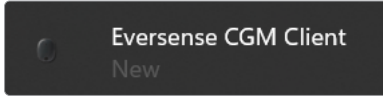

1. افتح تطبيق Eversense Client افتح قائمة "Start menu" في جهاز الكمبيوتر والبحث عن البرامج ضمن فئة "Recently Added" أو بالبحث عن "Eversense".

2. انقر لفتح مجلد "Eversense CGM Client"



3. انقر على "Upload My Transmitter Data"



ثم أدخل البريد الإلكتروني الذي استخدمته لإنشاء حسابك وكلمة مرورك

صِل جهاز الإرسال الذكي بحاسوبك باستخدام كابل USB.




نصيحة: بالنسبة لمستخدمي الحاسوب الشخصي، لتشغيل البرنامج سريعاً باستخدام أنظمة تشغيل Windows، يجب النقر بالزر الأيمن فوق أيقونة Eversense Client وتثبيتها على Taskbar أو قائمة Start.

4. عندما يُطلب منك ذلك، انقر فوق "Upload" لبدء تحميل بيانات جهاز الإرسال الذكي لحسابك

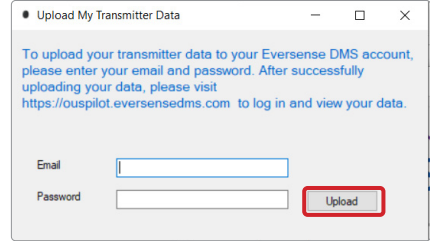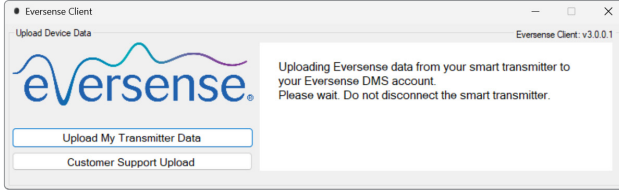


5. انقر على "OK" للمتابعة

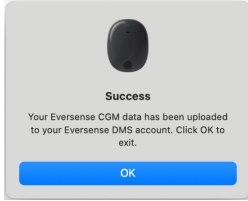

(أجهزة الحاسوب الشخصي)

(أجهزة Mac)

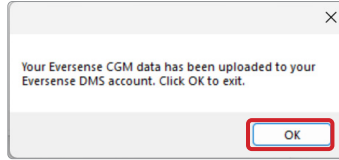


ملاحظة: عند التواصل مع دعم العملاء للمساعدة

الفنية، قد يُطلب منك تحميل السجل التشخيصي. سيستخدم هذا لإرسال ملف سجل تشخيصي من جهاز الإرسال الذكي لديك إلى دعم العملاء. لن تُستخدم هذه الوظيفة إلا مع استكشاف الأخطاء وحل المشكلات المتقدم بمساعدة دعم العملاء.

Data Share

يمكنك توصيل حساب Eversense DMS بحساب Eversense DMS Pro Clinic الخاص بمزود الرعاية الصحية. سيسمح هذا للعيادة بعرض بيانات الجلوكوز والتقارير الخاصة بك.

سوف تحتاج إلى رقم معرف DMS Pro Clinic الخاص بعيادتك. تواصل مع العيادة التي تتبعها إذا لم يكن لديك الرقم.

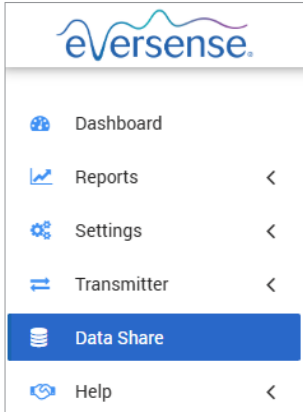


مشاركة البيانات مع عيادتك

لربط حساب Eversense DMS بحساب Eversense DMS Pro الخاص بالعيادة التي تتبعها:

1. من قائمة التنقل، اختر Data Share.

2. في المربع بجوار "#Clinic"، اكتب رقم معرف عيادة Eversense DMS Pro الخاص بعيادتك، ثم اختر العيادة من القائمة المنسدلة. انقر على "Select".

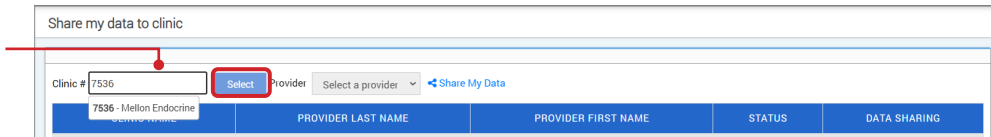

PROVIDER LAST NAME	PROVIDER FIRST NAME	STATUS	DATA SHARING
7536 - Mellon Endocrine			

3. حدد مقدم الرعاية الذي تتبعه من القائمة المنسدلة

4. انقر على رابط "Share My Data". سيتم الآن عرض عيادتك ومزود الرعاية الصحية في قائمة مشاركة البيانات الخاصة بك. سيتم عرض حالة العيادة على أنها Pending. بمجرد قبول العيادة لدعوتك، ستتغير الحالة إلى Accepted.

Share my data to clinic

Clinic # Select Provider Select a provider Share My Data

CLINIC NAME	PROVIDER LAST NAME	PROVIDER FIRST NAME	STATUS	DATA SHARING
Clinic two	clinictwo	dmsproie	Pending	Cancel

Clinic # Select Provider Select a provider Share My Data

CLINIC NAME	PROVIDER LAST NAME	PROVIDER FIRST NAME	STATUS	DATA SHARING
Mellon Endocrine	Mellon	Natalie	Accepted	Stop

قبول دعوة مشاركة البيانات من عيادتك

إذا دعاك مزود الرعاية الصحية لمشاركة بياناتك باستخدام حساب العيادة الخاص به في Eversense DMS Pro:

- من حساب Eversense DMS الخاص بك: اختر **Data Share** في قائمة التنقل اليسرى، وابحث عن اسم العيادة، ثم اقبل الدعوة أو ارفضها.

حذف العيادة التي تتبعها

- من حساب DMS الخاص بك: اختر **Data Share** في قائمة التنقل اليسرى، ثم اختر **”Stop”** أو **”Cancel”** من أمام اسم العيادة.

Help

About

توضح هذه الصفحة أحدث إصدارات من Eversense DMS وتطبيق Eversense Client.

تواصل معنا

معلومات الاتصال بخدمة دعم العملاء.

Contact Us

For Customer Support, please contact your local distributor. To see a list of Eversense distributors, please visit <https://global.eversensedebates.com/distributors>

ملاحظة مهمة: لطرح أسئلة عن نظام Eversense CGM الخاص بك، اتصل بالموزع المحلي.

ملاحظة مهمة: سيؤدي تعطيل حساب Eversense DMS لديك إلى إلغاء تنشيط حسابك لجميع منتجات Eversense.

Deactivate Account

Deactivate My Account

* Mandatory field

Please submit the form below to deactivate your account.

Reason *	<input type="text" value="Please select a valid reason"/>
Password *	<input type="password" value="Password"/>
Secret Question	What is the name of your first pet?
Answer *	<input type="text" value="Answer"/>

ملاحظات الإصدار

يوفر استعراضًا للتحديثات الأخيرة ببرنامج Eversense DMS.

ملاحظة: عندما يتوفر تحديث لبرنامج Eversense DMS، سيُعرض عنوان في أعلى الموقع. انقر على العنوان لعرض قائمة التحديثات.

Eversense NOW .22

المراقبة عن بُعد باستخدام نظام Eversense CGM وتطبيق Eversense NOW

يشمل تطبيق Eversense ميزة اختيارية للمراقبة عن بُعد. تتيح هذه الميزة رؤية بيانات Eversense CGM على شاشة ثانوية عبر تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول.

الاستخدام المستهدف

تطبيق Eversense NOW معدّ للاستخدام كشاشة ثانوية لعرض بيانات وتنبهات الجلوكوز من مستخدمي Eversense CGM.

الموانع

اتبع توجيهات العيادة وتوجيهات المؤسسات الأخرى حول استخدام جهازك المحمول في وجود أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز التصوير المقطعي المحوسب ومعدات الإجراءات الأخرى.

المخاطر

قد تكون هناك أوقات لا يمكن فيها إرسال بيانات الجلوكوز إلى تطبيق Eversense NOW. إذا لم تكن تتلقى بيانات الجلوكوز من مستخدم Eversense CGM، فلا يمكنك المساعدة في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة الجلوكوز. توفر خاصية المراقبة عن بُعد شاشة عرض ثانوية للبيانات. فهو ليس نظام مراقبة عن بُعد في الزمن الحقيقي.

قد لا يكون لدى مستخدمي Eversense CGM دائمًا اتصال لدعم نقل البيانات مثل الإنترنت/واي فاي أو 3G/4G/LTE. إذا لم يكن لديك أو لدى مستخدم Eversense CGM اتصال بالإنترنت، فلن تكون بيانات الجلوكوز الخاصة به متوفرة لك لاستعراضها. بإمكان أي مشكلة مع الأجهزة المحمولة أو الإنترنت اللاسلكي أو اتصال البيانات أو نظام إدارة بيانات (DMS) Eversense، أو إذا كان جهاز الإرسال الذكي لدى مستخدم CGM خارج نطاق جهازه المحمول، أو شحن جهاز الإرسال الذكي التسبب بعدم عرض البيانات. يجب ألا يعتمد مستخدم Eversense على أنك تراقب بيانات الجلوكوز لديه لمساعدته في حالة حدث جلوكوز مرتفع أو منخفض. تتوفر معلومات الأمان الإضافية على الموقع <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

الفوائد

نظام Eversense CGM المستخدم مع تطبيق Eversense NOW للمراقبة عن بُعد يمكنه أن يمنح مستخدمي CGM ثقة إضافية، لأنهم يعلمون أن أشخاصًا آخرين يمكنهم أيضًا رؤية بيانات CGM الخاصة بهم.

تحذيرات:

- ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق Eversense NOW لاتخاذ قرارات علاجية. يُعتبر تطبيق Eversense NOW شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense CGM وينبغي عدم استخدامها بدلًا من شاشة Eversense CGM الرئيسية. يجب أن يستعمل مستخدمو Eversense CGM دائمًا قيم جلوكوز الدم من جهاز القياس لاتخاذ قرارات العلاج. إن استخدام قيمة الجلوكوز من المستشعر لاتخاذ قرار علاجي يمكنه أو يؤدي إلى جلوكوز مرتفع أو منخفض في الدم.
- يجب ألا يعتمد مستخدمو Eversense CGM على أشخاص يراقبون قراءات الجلوكوز عن بُعد لإبلاغهم حول أحداث ارتفاع أو انخفاض الجلوكوز.

تنبيهات:

- تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول للمراقبة عن بُعد لا يحل محل نظام المراقبة حسب توجيه مزود الرعاية الصحية.
- إذا لم تكن خاصية Auto Sync (الخاصية التي تمكّن إرسال البيانات تلقائيًا إلى تطبيق Eversense NOW) قيد التشغيل لدى مستخدم Eversense CGM، فقد لا ترى اتجاهات وأحداث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.
- إذا لم يكن لديك ولدى مستخدم Eversense CGM اتصال بالإنترنت، أو إذا توقف عمل الجهاز المحمول لدى مستخدم CGM بسبب بطارية ضعيفة أو فارغة، لا يمكن عرض بيانات Eversense CGM الخاصة به على تطبيق Eversense NOW.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الأصوات على جهازك المحمول، فلن تتلقى على تطبيق Eversense NOW تنبيهات مسموعة حول بيانات CGM التي تقوم بمراقبتها عن بُعد.
- إذا قام مستخدم CGM بضبط وضعه على Offline (غير متصل بالإنترنت)، فلن تتلقى بيانات CGM الخاصة به على تطبيق Eversense NOW لديك.
- لا يتصل تطبيق Eversense NOW مع مستشعر Eversense و/أو جهاز إرسال Eversense الذكي بشكل مباشر.
- لا يستطيع تطبيق Eversense NOW أن يغير الإعدادات في تطبيق Eversense CGM.
- إذا لم تكن تسمح بالإشعارات من تطبيق Eversense NOW، فلن تتلقى تنبيهات متعلقة بالجلوكوز من مستخدم Eversense CGM.
- إذا كان جهازك المحمول مضبوطاً على وضع Do Not Disturb، فلن تسمع أي إشعارات من تطبيق Eversense NOW.

استعمال تطبيق Eversense NOW

يقدم هذا القسم تعليمات حول كيفية استخدام تطبيق Eversense NOW لمراقبة الجلوكوز عن بُعد لدى مستخدمي نظام Eversense CGM.

شكرًا لك لتنزيل تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول. يتيح لك تطبيق Eversense NOW مراقبة بيانات الجلوكوز عن بُعد لدى مستخدمي نظام Eversense CGM.

تنبيه: تطبيق Eversense NOW للمراقبة عن بُعد لا يستبدل شاشة العرض الرئيسية على تطبيق نظام Eversense CGM، أو نظام المراقبة بموجب توجيهات مزود الرعاية الصحية.

متطلبات النظام

- تنزيل تطبيق Eversense NOW على جهازك المحمول من Apple® App Store.
- جهاز Android أو Apple® iPhone® أو iPod® أو iPad® متوافق.
- للاطلاع على قائمة بالأجهزة المتوافقة وأنظمة التشغيل، يرجى الانتقال إلى الموقع global.eversenseddiabetes.com/compatibility.

ملاحظة: اتصال الإنترنت اللاسلكي ضروري لتنزيل التطبيق والحصول على قيم الجلوكوز عن بُعد للعرض على تطبيق Eversense NOW لديك. إذا قام مستخدم Eversense CGM بإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية، فلن يتم عرض قيم الجلوكوز على تطبيق Eversense NOW لديك.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية

يخضع استخدام تطبيق Eversense NOW للشروط والأحكام الواردة في أحدث اتفاقية ترخيص لمستخدم تطبيق Eversense NOW النهائي وسياسة الخصوصية لتطبيق Eversense NOW. يتم تحديث هذه الوثائق على نحو دوري ونشرها على الموقع global.eversenseddiabetes.com.

أجهزة بدون قیود

لا تستخدم تطبيقات Eversense على أجهزة iPhone أو iPad أو iPod التي بدون قیود. لا توفر الأجهزة التي بدون قیود مستوى مقبولاً من الأمان والدقة للمستخدم وهي غير معتمدة للاستخدام من شركة Senseonics.

المساعدة والدعم

إذا كنت لا تفهم شيئاً في دليل المستخدم هذا، فاتصل بالموزع المحلي أو تفضل بزيارة global.eversenseddiabetes.com لتحديد مكان الموزع المحلي.

الانضمام إلى Eversense Circle

تشير Eversense Circle إلى مجموعة الأشخاص القادرين على مراقبة بيانات الجلوكوز والتنبيهات المرتبطة بالجلوكوز عن بُعد لدى مستخدم Eversense CGM. للانضمام إلى Circle، ستحتاج أن تقبل دعوة بالبريد الإلكتروني ستلقاها من مستخدم Eversense CGM، وإنشاء حساب على موقع Eversense DMS وتنزيل تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول.

تنزيل تطبيق Eversense NOW


1. توجه إلى Apple App Store أو Google Play Store وابحث عن "Eversense NOW".

2. انقر فوق رمز Eversense NOW، وقم بتنزيل وتثبيت التطبيق على جهازك الذكي.

3. عندما يُطلب منك ذلك، انقر فوق "Allow" من أجل تلقي التنبيهات المتعلقة بالجلوكوز من مستخدم Eversense CGM في قائمتك.

تنبيه: إذا لم تكن تسمح بالإشعارات من تطبيق Eversense NOW، فلن تتلقى تنبيهات متعلقة بالجلوكوز من مستخدم Eversense CGM.

ملاحظة مهمة: لا تضيف التطبيق إلى المساحة الخاصة أو ميزات الأجهزة المحمولة المماثلة التي قد تمنعه من تقديم الإشعارات أو التواصل مع باقي النظام.

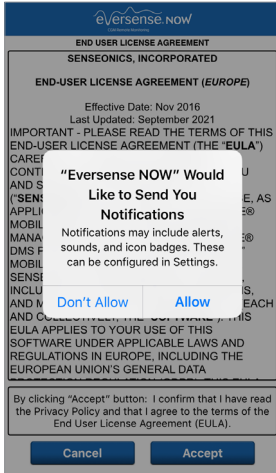

4. قم بإنشاء حساب Eversense لتسجيل الدخول إلى التطبيق.

ملاحظة: إذا كان لديك حساب Eversense سابق، فلن تحتاج إلى إنشاء حساب جديد لاستخدام Eversense NOW.

ملاحظة: لأغراض الأمان إذا أدخلت كلمة مرور خاطئة ثلاث مرات على التوالي في تطبيق الهاتف المحمول، فسيتم قفل حسابك لمدة 30 دقيقة. خلال هذا الوقت، لن تتمكن من الوصول إلى بيانات مستخدم Eversense CGM للمراقبة عن بُعد.

5. اقبل اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

6. قم باختيار وحدة القياس. سوف تنطبق وحدة القياس التي ستختارها على جميع مستخدمي Eversense CGM الذين يمكنك رؤية بياناتهم. لا يمكنك تغيير وحدة القياس بعد أن يتم تثبيت التطبيق.

UNIT OF MEASUREMENT
The glucose reading has **changed** to be displayed in the unit of measurement shown below.

Unit of Measurement: **mg/dL**
Example: 160 **mg/dL** (or anywhere in the 40-400 **mg/dL** range)

mg/dL ✓

mmol/L

If you wish to change your unit of measurement to **mmol/L**, you can only do so at this time. To change the Unit of Measurement, you must delete the Eversense NOW app and reinstall it.

END USER LICENSE AGREEMENT

Cancel Accept

Back Eversense NOW

Email
onew****

Password

[Create an account](#) [Forgot my password](#)

LOG IN



[Delete Account](#)

الدعوة إلى Circles

تشير Eversense Circle إلى مجموعة الأشخاص القادرين والمصرح لهم بمراقبة بيانات الجلوكوز والتنبيهات المرتبطة بالجلوكوز عن بُعد لدى مستخدم Eversense CGM. للانضمام إلى Circle، ستحتاج إلى إنشاء حساب وتنزيل تطبيق Eversense NOW للجهاز المحمول.

قبول أو رفض دعوة للانضمام إلى Eversense Circle




Eversense Circle هي مجموعة من الأشخاص قد قام مستخدم Eversense CGM بدعوتهم لرؤية بياناته الخاصة بالجلوكوز والتنبيهات عن بُعد. كعضو مدعو للانضمام إلى Circle، ستلقى دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى Circle. لقبول الدعوة، سوف تحتاج إلى تطبيق Eversense NOW.

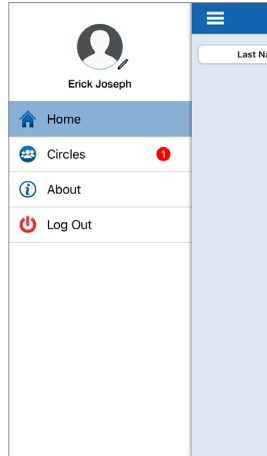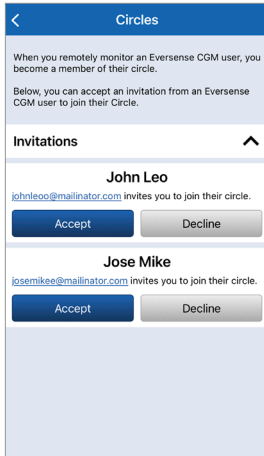

يمكنك إدارة أي دعوات معلقة قد تكون تلقيتها ضمن قائمة Circles. لديك خيار قبول أو رفض كل دعوة معلقة.


لقبول دعوة:

1. في Main Menu، اضغط على "Circles".
2. اضغط على "Accept".
3. اضغط على "OK" للتأكيد.
4. سيتم عرض اسم/صورة مستخدم Eversense CGM على الصفحة الرئيسية.

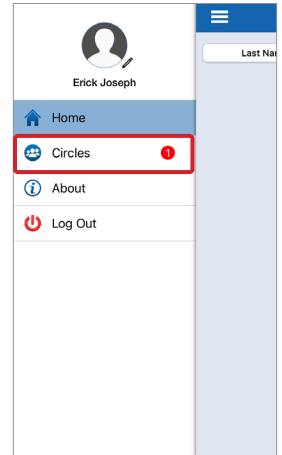
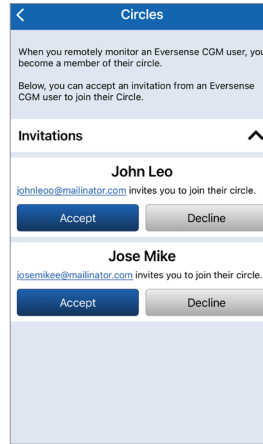
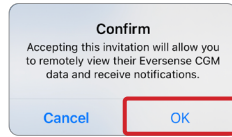


لرفض دعوة:

1. اضغط على "Decline".
2. اضغط على "OK" للتأكيد.
3. سيتم إزالة الدعوة من قائمة الدعوات الخاصة بك.


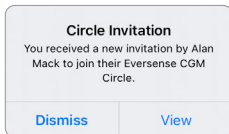


إذا كان تطبيق Eversense NOW مفتوحًا وتلقيت دعوة جديدة، فسوف تتلقى نافذة منبثقة للإشعار.

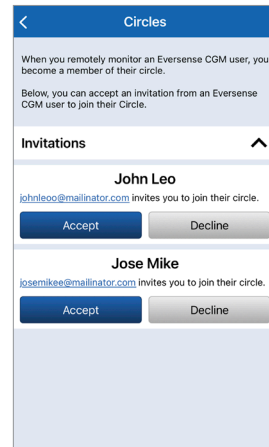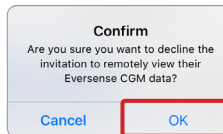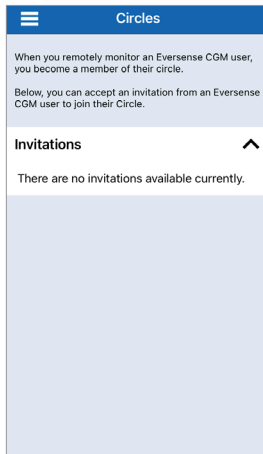

إزالة أحد مستخدمي Eversense CGM من قائمتك



إن إزالة أحد مستخدمي Eversense CGM من قائمتك تعني أنك لن تكون قادرًا بعد الآن على مراقبة بيانات الجلوكوز الخاصة به عن بُعد. لإرجاع مستخدم إلى قائمتك مرة أخرى، تواصل مع مستخدم Eversense CGM ليرسل لك دعوة جديدة.

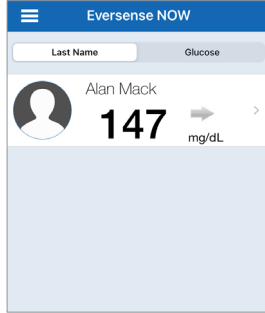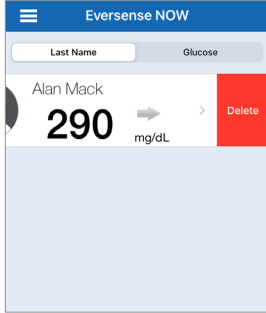

1. قم بتمرير اسم مستخدم نظام Eversense CGM على الصفحة الرئيسية إلى اليسار.

2. انقر على "Delete".


سيطال بك إنذار بتأكيد رغبتك في إزالة مستخدم Eversense CGM.

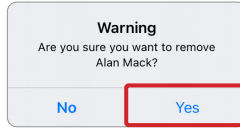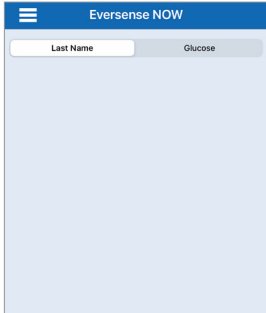

3. انقر فوق "Yes" لإزالة هذا الشخص نهائيًا من قائمتك.

لن تعرض الصفحة الرئيسية هذا المستخدم في قائمتك بعد الآن.

ملاحظة: قد يستغرق الأمر حتى ساعتين قبل أن يرى مستخدم Eversense CGM أنك لم تعد في دائرته على تطبيق Eversense CGM.

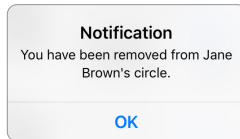

ملاحظة: يستطيع أحد مستخدمي Eversense CGM أيضًا أن يقوم بإزالةك من دائرته. إذا حدث ذلك، فسيظهر هذا الإشعار.

القائمة الرئيسية

تعرض القائمة الرئيسية إمكانية الوصول إلى *Eversense NOW Home page*، وصفحة *Circles*، وصفحة *About*، وصفحة *log out*.


تربطك صفحة About بموقع Eversense CGM الإلكتروني، وتوفر إصدار التطبيق وتاريخ إصدار التطبيق.

للوصول إلى خيارات القائمة الرئيسية، انقر فوق رمز الأشرطة الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.


من القائمة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى Home page لرؤية مستخدم Eversense CGM في قائمتك أو استعراض المعلومات حول تطبيق Eversense NOW على صفحة About أو تسجيل الخروج من التطبيق أو إضافة صورة للملف الشخصي.



About

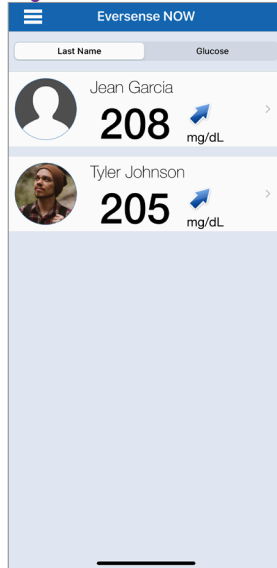


Home

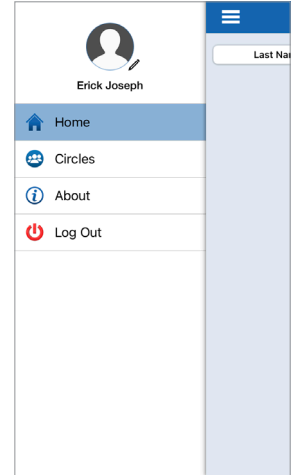


يمكنك إضافة صورة للملف الشخصي
من خلال النقر فوق profile photo
في Main Menu على تطبيق
Eversense NOW. اتبع رسائل
المطالبة على الشاشة لالتقاط أو إضافة
صورة قد تم حفظها على جهازك
المحمول. صورة الملف الشخصي
التي ستضيفها ستعرض أيضاً على
تطبيق مستخدم CGM إلى جانب اسمك.

سوف يطلب منك Eversense
NOW التأكيد قبل تسجيل
الخروج. إذا خرجت من
التطبيق، فستحتاج إلى إدخال
اسم المستخدم وكلمة المرور
لإعادة فتح التطبيق.

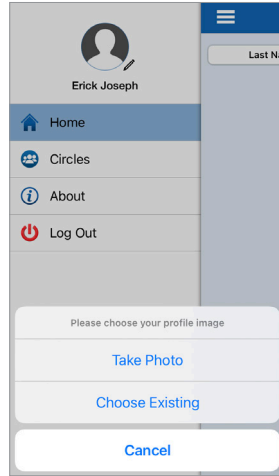

صور الملف الشخصي

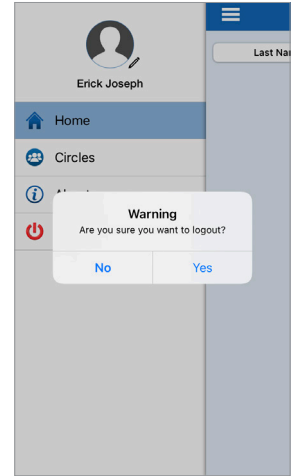

تسجيل الخروج

رؤية بيانات CGM

تعرض Home Page قائمة بأسماء الأشخاص الذين يمكنك رؤية بيانات CGM الخاصة بهم عن بُعد، بالإضافة إلى أحدث قيمة CGM لديهم، وسهم اتجاه يشير إلى اتجاه ومعدل التغيير.

يتم ترتيب القائمة حسب اسم العائلة كخيار افتراضي. يمكنك ترتيب القائمة حسب اسم العائلة أو قيمة الجلوكوز عن طريق النقر فوق علامة التبويب المرغوبة بأعلى الصفحة.

Eversense NOW Home Page


لتحديث Home Page:

1. افتح Home Page.


2. اسحب لأسفل من داخل Home Page.

يتم تحديث Glucose data من مستخدم CGM بشكل تلقائي على تطبيق Eversense NOW كل 5 دقائق تقريبًا عندما يكون لديك ولدى مستخدم CGM اتصال بالإنترنت ويتم تفعيل مشاركة البيانات.

تنبيه: إذا قام مستخدم Eversense CGM بإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية Auto Sync، فلن يتم إرسال بيانات الجلوكوز تلقائيًا إلى تطبيق Eversense NOW لديك.

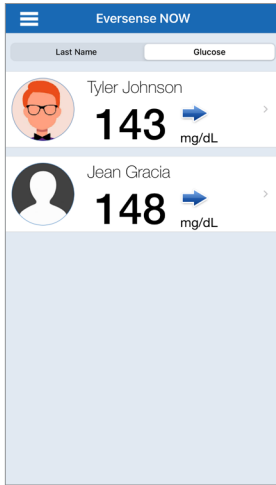

ترتيب Home Page حسب قيمة الجلوكوز، من الأدنى إلى الأعلى

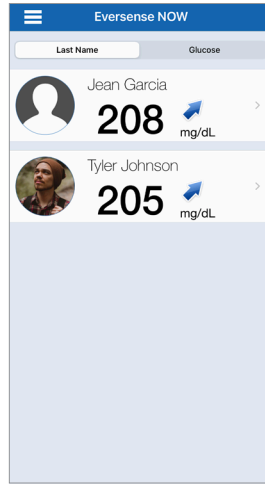

ترتيب Home Page حسب اسم العائلة

أسهم الاتجاهات

سوف ترى بجانب اسم مستخدم Eversense CGM سهم الاتجاه. يُظهر سهم الاتجاه اتجاه الجلوكوز الحالي ومدى سرعة تغير اتجاه الجلوكوز.

يستخدم التطبيق آخر 20 دقيقة من بيانات الجلوكوز المستمرة لحساب اتجاهات الجلوكوز. عند عدم توافر قيم مستشعر كافية لإجراء الحساب، لا يتم عرض السهم.

مستويات الجلوكوز التي ترتفع أو تنخفض تدريجيًا، والتي تنخفض أو ترتفع بمعدل يتراوح بين 0.0 mg/dL و1.0 mg/dL في الدقيقة.	➔
مستوى الجلوكوز الذي يرتفع بمعدل معتدل يتراوح بين 1.0 mg/dL و2.0 mg/dL في الدقيقة.	➡
مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل معتدل يتراوح بين 1.0 mg/dL و2.0 mg/dL في الدقيقة.	➠
مستويات الجلوكوز التي ترتفع بمعدل سريع جدًا يزيد على 2.0 mg/dL في الدقيقة.	⬆
مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل سريع جدًا يزيد على 2.0 mg/dL في الدقيقة.	⬇

هناك خمسة أوضاع مختلفة قد تراها بجوار اسم مستخدم نظام Eversense CGM.

“---”

تم توصيل جهاز الإرسال الذكي الخاص بالمستخدم ولكنه لا يتلقى حاليًا بيانات الجلوكوز أو أنه لا توجد بيانات جلوكوز كافية لعرض قيمة ما. وقد يكون هذا بسبب:

- نظام CGM في مرحلة الإجماء.
- مستخدم CGM في مرحلة التهيئة ولم يحصل حتى الآن على أول قراءة للجلوكوز لديه.
- تلقى المستخدم تنبيهًا يمنع عرض بيانات الجلوكوز.

قراءة الجلوكوز الأخيرة
يتلقى المستخدم بيانات الجلوكوز
بشكل فعال.



“Offline”

لقد أوقف المستخدم مشاركة البيانات معك بشكل مؤقت. (قد يستغرق الأمر حتى 10 دقائق ليتم عرض تحديث الوضع هذا على تطبيق Eversense NOW لديك.)



“No Internet”

- عندما لا يكون مستخدم Eversense CGM متصلاً بالإنترنت.
- قام مستخدم CGM بإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية.

“Transmitter Disconnected”


لا يوجد توصيل بين جهاز الإرسال الذكي وتطبيق Eversense CGM. وقد يكون هذا بسبب:

- يجب إعادة شحن بطارية جهاز الإرسال الذكي أو يجري شحنها.
- من الممكن أنه قد تم إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth أو الجهاز المحمول.
- جهاز الإرسال الذكي خارج النطاق أو تم إيقاف تشغيله.



الاتصال بالإنترنت

يجب أن يكون هناك اتصال بالإنترنت لكي يتمكن تطبيق Eversense NOW من عرض بيانات Eversense CGM. إذا تم فصل الهاتف عن الإنترنت، فسوف تظهر النافذة المنبثقة التالية:

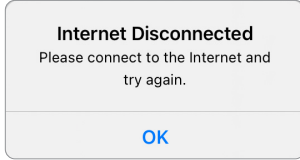

لن يتم عرض قائمة مستخدمي CGM في Eversense NOW وبيانات الجلوكوز الخاصة بهم حتى يتم استعادة اتصال الإنترنت.

بمجرد استعادة اتصال الإنترنت، سيتم عرض قائمة مستخدمي CGM في Eversense NOW وبيانات الجلوكوز الخاصة بهم.

الرسم البياني للاتجاه

للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن الجلوكوز لدى مستخدم CGM، انقر فوق اسم أي شخص يستخدم نظام Eversense CGM على الصفحة الرئيسية. تعرض الشاشة الأولى رسماً بيانياً لاتجاه قيم الجلوكوز من مستشعر المستخدم خلال الساعات الثلاث الماضية. يُظهر سهم الاتجاه اتجاه تحرك الجلوكوز الحالي ومدى سرعة تغير اتجاه الجلوكوز.

لتحديث الشاشة، انقر فوق  رمز التحديث.



الإعدادات

تخصيص إعدادات الهدف والتنبيه.

تحديث

يحمل أحدث بيانات جلوكوز متزامنة.

سهم الاتجاه

الاتجاه الذي يتحرك فيه جلوكوز المستخدم ومدى السرعة (ارتفاع أو انخفاض تدريجي، معتدل أو سريع).

وحدة القياس

وحدة القياس المستعملة لعرض كل بيانات الجلوكوز.

خطوط متقطعة حمراء

إعدادات التنبيه المرتفع والمنخفض.

خطوط متقطعة خضراء

النطاق المستهدف المرتفع والمنخفض.

منطقة خضراء تحت خط الاتجاه

تشير إلى أن قيم الجلوكوز لدى المستخدم كانت ضمن النطاق المستهدف الذي تم ضبطه.

منطقة صفراء تحت خط الاتجاه

تشير إلى أن قيم الجلوكوز لدى المستخدم كانت خارج النطاق المستهدف الذي تم ضبطه ولكن داخل نطاق التنبيه الذي تم ضبطه.

منطقة حمراء تحت خط الاتجاه



تشير إلى أن قيم الجلوكوز لدى المستخدم كانت خارج نطاق التنبيه الذي تم ضبطه.

الإعدادات المخصصة

سينبهك تطبيق Eversense NOW App عندما تتجاوز مستويات الجلوكوز إعدادات التنبيه التي اخترتها لمستخدم CGM هذا. تعكس الإعدادات المعروضة (الافتراضية) إعدادات مستخدم CGM. يمكنك تخصيص مستويات التنبيه التي ترغب أن ينبهك تطبيق Eversense NOW عند الوصول إليها. بمجرد ضبطه، سيصدر التطبيق تنبيهًا صوتيًا (اعتمادًا على إعدادات هاتفك) بالإضافة إلى عرض رسالة على الشاشة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير إعدادات التنبيه أو الهدف إلى تغيير إعدادات التنبيه أو الهدف التي قام مستخدم CGM بتعيينها على نظامه.

عندما تقوم بعرض الرسم البياني للاتجاه لمستخدم نظام CGM، يمكنك تخصيص إعدادات التنبيه بالضغط على .

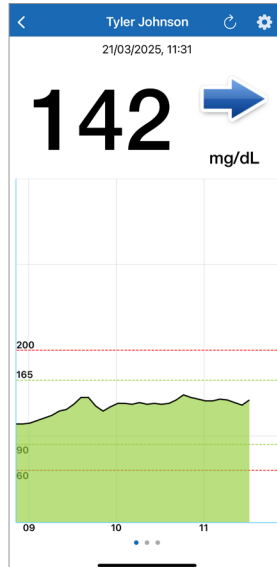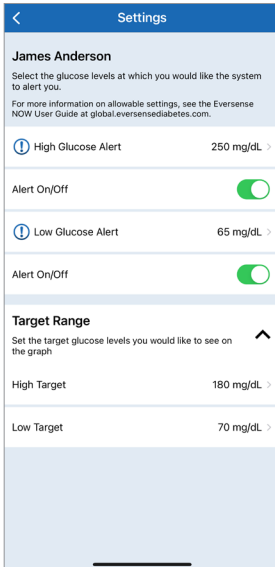

لتخصيص إعدادات الهدف والتنبيه:

1. اضغط على .

2. حدد مستويات تنبيه الجلوكوز المرتفع والمنخفض التي تريد أن ينبهك النظام عندها.
 - أ. اضغط على "High Glucose Alert" وحدد مستوى التنبيه المناسب لارتفاع الجلوكوز.
 - ب. اضغط على "Done" عندما تنتهي.
 - ت. كرر الخطوة لتحديد اختيار "Low Glucose Alert".

إعدادات المعروضة (الافتراضية)	إعدادات مستخدم CGM
الإعدادات المسموح بها	منخفض: 60 - 115 mg/dL مرتفع: 125 - 350 mg/dL
إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل	يمكن تشغيل أو إيقاف الإعدادين "التنبيه بانخفاض الجلوكوز" و"التنبيه بارتفاع الجلوكوز".

3. حدد مستويات الجلوكوز المستهدفة. هذه هي المستويات المنخفضة والعالية المستخدمة للإشارة إلى متى تكون قيم الجلوكوز لدى مستخدم CGM ضمن النطاق المستهدف. يجب ضبط النطاق المستهدف المرتفع والمنخفض ضمن مستويات تنبيه الجلوكوز المرتفع والمنخفض المخصصة التي حدتها.
- أ. من **Glucose Target Levels**، اضغط على **“High Target”** وحدد المستوى المستهدف للجلوكوز المرتفع المناسب لحالتك.
- ب. اضغط على **“Done”** عندما تنتهي.
- ت. كرر الخطوة لتحديد اختيار **“Low Target”**.

إعدادات المعروضة (الافتراضية)	إعدادات مستخدم CGM
الإعدادات المسموح بها	منخفض: 65 - 120 mg/dL مرتفع: 120 - 345 mg/dL
إعداد التشغيل/إيقاف التشغيل	دائمًا قيد التشغيل
ملاحظات	تُستخدم في الرسوم البيانية والتخطيطية على التطبيق لتوضيح الوقت المنقضي في النطاق المستهدف.

تحذيرات: ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق Eversense NOW لاتخاذ قرارات علاجية. يُعتبر تطبيق Eversense NOW شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense CGM وينبغي عدم استخدامها بدلاً من شاشة Eversense CGM الرئيسية.

تنبيهات Eversense NOW


عندما تكون قيمة الجلوكوز لدى مستخدم Eversense CGM خارج نطاق التنبيه المحدد، فسوف يندفع تطبيق Eversense NOW. سوف تظهر هذه التنبيهات بإحدى الطرق الأربعة التالية: على شاشة الإغلاق أو كإشعار في الجزء العلوي من الشاشة أو كشاشة منبثقة في التطبيق أو على ساعة Apple.

تحذير: ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق Eversense NOW لاتخاذ قرارات علاجية. يُعتبر تطبيق Eversense NOW شاشة عرض ثانوية لبيانات Eversense CGM وينبغي عدم استخدامها بدلاً من شاشة Eversense CGM الرئيسية.


ملاحظة: يجب تفعيل Notification mirroring في إعدادات إشعارات ساعة Apple لتطبيق Eversense NOW من أجل الحصول على تنبيهات الجلوكوز على ساعة Apple.



تنبيه: على ساعة Apple

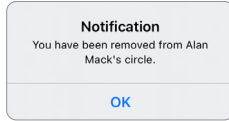

تنبيه: شاشة منبثقة في التطبيق

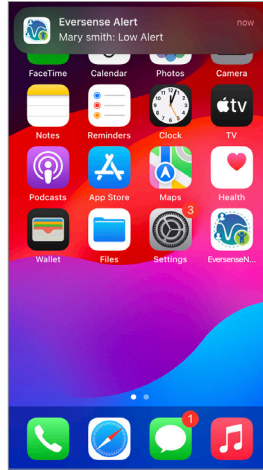

تنبيه: إشعار



تنبيه: إقفال الشاشة

Glucose Alerts		
Thursday, 16 May 2024		
🚨	Out of Range High Glucose	12:54
🚨	Out of Range Low Glucose	12:53
Wednesday, 15 May 2024		
🚨	High Glucose	19:04
🚨	Low Glucose	18:34
🚨	High Glucose	17:50
🚨	High Glucose	17:42
🚨	High Glucose	17:34
🚨	Low Glucose	16:45
Tuesday, 14 May 2024		
🚨	High Glucose	17:08
🚨	Low Glucose	17:07

Alert History

لرؤية تاريخ تنبيهات الجلوكوز لدى مستخدم نظام Eversense CGM، قم بالتمرير على الشاشة إلى اليسار من الرسم البياني للاتجاه.


سوف تدرج شاشة **Alert History** آخر 20 تنبيهًا مرتبطًا بالجلوكوز عرضه تطبيق Eversense CGM.

تراقب هذه التنبيهات الأحداث مثل تنبيهات ارتفاع الجلوكوز وانخفاضه.

Event Log

لرؤية Event Log الخاص بمستخدم نظام Eversense CGM، قم بالتمرير على الشاشة نحو اليسار من Alert History (تاريخ التنبيه).

يُدرج **Event Log** آخر 20 حدثاً تم تسجيله من قبل مستخدم CGM. يُعرض Event Log المعلومات التي تم إدخالها من قبل مستخدم Eversense CGM مثل المعايرة، وجبات الطعام، التمارين، قيم جلوكوز الدم، مستويات الأنسولين، الصحة وممارسة الرياضة. إذا لم يتم المستخدم بإدخال أي أحداث، فسيكون هذا السجل فارغاً.

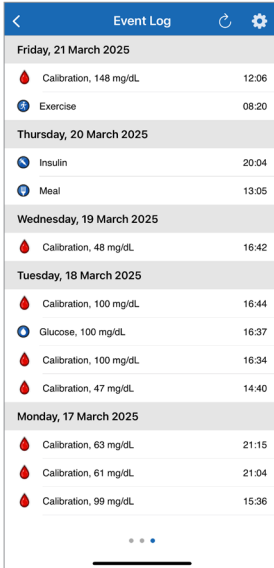

Event Log		
Friday, 21 March 2025		
Calibration, 148 mg/dL		12:06
Exercise		08:20
Thursday, 20 March 2025		
Insulin		20:04
Meal		13:05
Wednesday, 19 March 2025		
Calibration, 48 mg/dL		16:42
Tuesday, 18 March 2025		
Calibration, 100 mg/dL		16:44
Glucose, 100 mg/dL		16:37
Calibration, 100 mg/dL		16:34
Calibration, 47 mg/dL		14:40
Monday, 17 March 2025		
Calibration, 63 mg/dL		21:15
Calibration, 61 mg/dL		21:04
Calibration, 99 mg/dL		15:36

إشعارات قانونية

إشعار قانوني خاص بشركة Apple

تعني عبارات "مصنوع لجهاز iPod touch" و"مصنوع لجهاز iPhone" و"مصنوع لجهاز iPad" أن أحد الملحقات الإلكترونية قد تم تصميمه ليُتصل تحديداً بجهاز iPod touch أو iPhone أو iPad على التوالي وتم اعتماده من المطور ليحقق معايير أداء شركة Apple. لا تتحمل شركة Apple المسؤولية عن تشغيل هذا الجهاز أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى الانتباه إلى أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPod touch أو iPhone أو iPad يمكنه أن يؤثر على الأداء اللاسلكي.

Apple و iPad و iPhone و iPod و iPod touch علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

إشعار قانوني خاص بشركة Google

اسم "Android" وشعار Android و Google Play و Google Inc. علامات تجارية مملوكة لشركة Google Inc.

معلومات حول Bluetooth®

Bluetooth® نوع من الاتصال اللاسلكي (التردد اللاسلكي). تستخدم الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية تقنية Bluetooth® كما هو الحال في الكثير من الأجهزة الأخرى. يستخدم جهاز الإرسال الذكي الخاص بـ Bluetooth® Smart للاقتتران بالجهاز المحمول ولإرسال النتائج إلى التطبيق.

علامة Bluetooth® التجارية

علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth® SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة Senseonics, Inc. هو بموجب ترخيص.

معلومات لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق جهاز الإرسال الذكي مع الجزء 15 في قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
(1) لن يسبب هذا الجهاز أي تداخل ضار.

(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

يمكن أن تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحة من شركة Senseonics, Inc. إلى إلغاء التفويض الممنوح للمستخدم لتشغيل الجهاز.

تساعد هذه الإرشادات على ضمان عدم تأثير جهاز الإرسال الذكي الخاص بك على تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى القريبة. كما أن الأجهزة الإلكترونية الأخرى ينبغي ألا تؤثر على استخدام جهاز الإرسال الذكي الخاص بك.

باستثناء جهازك المحمول، قد تمنع أو تؤخر الأجهزة اللاسلكية الإلكترونية الأخرى قيد الاستخدام في مكان قريب، مثل الهاتف الخليوي أو الميكرويف أو الشبكة اللاسلكية، نقل البيانات من جهاز الإرسال الذكي الخاص بك إلى التطبيق أو تأخره. وقد يسمح الانتقال بعيداً عن هذه الأجهزة الإلكترونية أو إيقاف تشغيلها بالاتصال.

تم اختبار جهاز الإرسال الذكي وتبين أنه ملائم للاستخدام في المنزل. في معظم الحالات، ينبغي ألا يتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المنزلية الأخرى إذا تم استخدامه حسب التعليمات. إلا أن جهاز الإرسال الذكي هذا يُصدر طاقة تردد لاسلكي. إذا لم يتم استخدام جهاز الإرسال الذكي الخاص بك بالشكل الصحيح، فقد يتداخل مع تلفازك أو مذياعك أو أجهزةك الإلكترونية الأخرى التي تتلقى إشارات التردد اللاسلكي أو تبثها.

إذا تعرضت لمشاكل تداخل في التشغيل من جهاز الإرسال الذكي، فحاول أن تنتقل بعيداً عن مصدر التداخل. يمكنك أيضاً نقل الجهاز الإلكتروني أو الهوائي الخاص به إلى موقع آخر لحل المشكلة.

إذا استمر التعرض لتداخل، اتصل بخدمة العملاء في الشركة منتجة الجهاز الإلكتروني المسبب للتداخل.

توجيه المعدات اللاسلكية

تعلن شركة Senseonics, Inc. أن نوع جهاز الإرسال الذكي Eversense E3 هذا متوافق مع التوجيه 2014/53/EU. والنص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: <https://global.eversensedibabetes.com/declarationofconformity>.

78	شاشة MY GLUCOSE .33, 58, 61	77	الرسم البياني للاتجاه	64	أسهم الاتجاهات
47	صيانة جهاز الإرسال الذكي		الرموز والتغليف	185, 184	إدخال المستشعر وإخراجه
47	بطاقة البطارية، المؤشر	230, 229, 228	والجهاز	190	إعادة تشغيل Bluetooth
305, 58, 23, 12	لاسلكي		الرموز والتنبيهات		إعادة ضبط جهاز
48, 46, 41, 25	مؤشر مصباح LED ..	227, 226, 225	والإشعارات	191, 122	الإرسال الذكي
	معلومات لجنة الاتصالات		الزر في جهاز	93	إعداد الغفوة
306	الفيديوية	46, 41, 30	الإرسال الذكي		إقران جهاز الإرسال الذكي
9	مكونات النظام	186	السفر	190, 30, 27	مع جهاز محمول
25	مهائى الطاقة	78	القائمة	136, 78	الأحداث
78, 44	موجه الموضوع، قوة الإشارة	183	المستشعر		الأسئلة المتكررة حول استكشاف
146	نظام إدارة البيانات (DMS)	83	المستويات المستهدفة	187	الأخطاء وإصلاحها
31	وحدة القياس	78, 54, 49	المعايرة، الإجراء	173, 132, 107	الإشعارات
	وضع عدم الإزعاج	52, 49	المعايرة، المرحلة اليومية	90, 79, 78, 27	الإعدادات، التطبيق
101	Do Not Disturb	51, 49	المعايرة، مرحلة التهيئة	24	البطارية، الشحن
305, 78	Bluetooth	103	الملف الشخصي المؤقت	58	التطبيق، الاستخدام
190	Bluetooth، إعادة تشغيل	190, 30	الوضع القابل للاكتشاف	153	التطبيق، تسجيل الخروج
192	Discoverable mode	43	تركيب جهاز الإرسال الذكي	27	التطبيق، تشغيل
233, 146	Eversense DMS	46	تشغيل/إيقاف جهاز الإرسال الذكي	26	التطبيق، تنزيل
281	Eversense NOW		جهاز الإرسال الذكي،		التطبيق، معلومات المنتج
	MRI	191, 122	إعادة ضبط	152, 150	التطبيق، نبذة
15, 14	التصوير بالرنين المغناطيسي	42, 41	جهاز الإرسال الذكي، استخدام	78, 10	التقارير
177, 148	My Circle	15	حامل الشحن	143, 78	التنبيهات
305	RF، الاتصال بالتردد اللاسلكي	186, 183, 9	حول المستشعر	106, 93, 87, 85, 81, 78	110, 108, 107
146	Share My Data		حول جهاز الإرسال الذكي		التنبيهات والإشعارات، ساعة
24	USB، الكابل	15, 9	ربط جهاز الإرسال الذكي	157	Apple Watch
24	USB، المنفذ	35	بالمستشعر	60, 26	الجهاز المحمول
		45, 43	رقعة لاصقة	154	Apple Watch، الجهاز المحمول

:Basic UDI/DI

081749102FG3500T8 :Eversense E3 طقم جهاز الإرسال الذكي

081749102FG6400TQ :Eversense E3 طقم رقعات اللاصقة

081749102FG6501TX :Eversense لـ حامل الشحن

081749102FG5101T4 :iOS تطبيق للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام

081749102FG5301TE :Android تطبيق للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام

081749102FG5200T7 :Eversense DMS تطبيق

081749102FG5400TH :Eversense NOW نظام التشغيل iOS لتطبيق

81749102FG5401TK :Eversense NOW نظام التشغيل Android لتطبيق للأجهزة المحمولة

Call 04-6175390 for Customer Support.

Distributed by:

DYN Diagnostics Ltd.
7 Ha'eshel St. P.O. Box 3063
Caesarea Industrial Park 3079504, Israel
Phone: 04-6175390
Email: patient.care@dyn.co.il

שם הרישום באמ"ר:

מערכת לניטור סוכר רציף Eversense E3

Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring System

מס' רישום: 2660816

שם היצרן וכתובתו: סנסאוניקס, אינק. סנקה מדווס

פארקווי 20451, ג'רמנטאון, אמ.ד.י. 20876-7005, ארה"ב

פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיץ בישראל:

דין דיאגנוסטיקה בע"מ

רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504

04-6175390

patient.care@dyn.co.il

اتصل بـ 04-6175390 لدعم المستخدم.

**eversense** ^{E3}

Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows Parkway

Germantown, MD 20876-7005 USA

global.eversensed diabetes.com

براءات الاختراع:

www.senseonics.com/products/patents

**Senseonics**



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



(241) LBL-4202-44-001_REV_K

