


Guía de referencia rápida



Sensor



Transmisor
inteligente

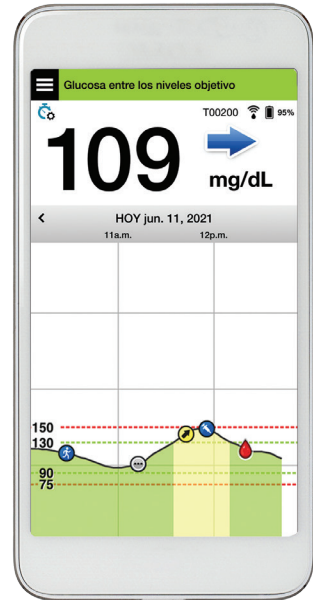

Aplicación para móvil

Consulte la *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365* para obtener información más detallada.

Indicaciones de uso

El sistema de MCG Eversense 365 está indicado para medir de forma continua los niveles de glucosa en personas adultas (18 años o más) con diabetes durante 1 año como máximo. Este sistema está indicado para sustituir las mediciones de glucemia con punción digital para tomar decisiones de tratamiento de la diabetes.

El sistema está destinado a lo siguiente:

- Proporcionar lecturas de glucosa en tiempo real.
- Proporcionar información sobre tendencias de glucosa.
- Proporcionar alertas para la detección y predicción de episodios de glucemia baja (hipoglucemia) y glucemia alta (hiperglucemia).
- Ayudar al control de la diabetes.

Los datos históricos del sistema se pueden interpretar para ajustar el tratamiento. Estos ajustes se deben basar en patrones y tendencias observadas a lo largo del tiempo.

El sistema está previsto para su uso en un solo paciente.

Contraindicaciones

El transmisor inteligente es incompatible con los procedimientos de captación de imágenes de resonancia magnética (RMN). El transmisor inteligente no es seguro para RM y DEBE RETIRARSE antes de realizar un procedimiento de RMN (imágenes de resonancia magnética). Para obtener información sobre el sensor, consulte *Información de seguridad para la RMN*.

El sistema está contraindicado en personas en las que la dexametasona o el acetato de dexametasona estén contraindicados.

El manitol o el sorbitol, cuando se administran por vía intravenosa o como componentes de una solución de irrigación o solución de diálisis peritoneal, pueden incrementar las concentraciones de manitol o sorbitol en sangre y provocar lecturas elevadas falsas de los resultados de la glucosa del sensor. El sorbitol se usa en algunos edulcorantes artificiales y los niveles de concentración ingeridos en una dieta normal no afectan a los resultados de la glucosa del sensor.

Transmisor inteligente Eversense 365


El transmisor inteligente alimenta el sensor, calcula las lecturas de glucosa y almacena y envía los datos a la aplicación. También proporciona alertas mediante vibración sobre el cuerpo. El transmisor inteligente se sujeta a la piel mediante un parche adhesivo desechable que se cambia a diario.



Llevar puesto el transmisor inteligente

- Sustituya el parche adhesivo del transmisor inteligente a diario.
- El transmisor inteligente se puede quitar y volver a colocar sobre la piel en cualquier momento.

Nota: El transmisor inteligente es resistente al agua (IP67) hasta una profundidad de 1 metro (3,2 pies) durante un máximo de 30 minutos.

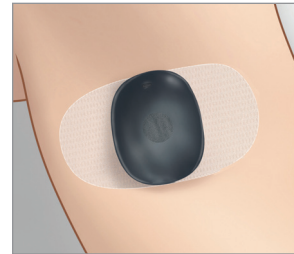

Encender y apagar el transmisor inteligente

Para encender el transmisor inteligente, mantenga pulsado el botón táctil durante unos tres segundos.

Para apagar el transmisor inteligente, mantenga pulsado el botón táctil durante unos cinco segundos.

Para ver si el transmisor inteligente está encendido, pulse el botón táctil una vez. Si el LED aparece, significa que el transmisor inteligente está encendido. Si no se enciende el LED, significa que el transmisor inteligente está apagado.

Indicadores LED de estado de la batería durante la carga del transmisor inteligente:

Estado del LED	Estado de la batería	Acción
Naranja brillante cuando está conectado con el cable USB	Menos de 24 horas de carga disponibles	Cárguelo durante al menos 15 minutos o hasta que el LED parpadee en verde antes de desconectarlo de la fuente de alimentación.
Verde intermitente cuando está conectado con el cable USB	Aproximadamente 24 horas de carga disponibles	Utilícelo o continúe cargándolo hasta que el LED se ilumine en verde fijo.
Verde fijo cuando está conectado con el cable USB	Cargado al 100 %	Listo para usar.

Indicadores LED de estado mientras se usa el transmisor inteligente:

Estado del LED	Estado	Acción
Parpadea en azul cuando el botón se pulsa 3 veces en 5 segundos.	Modo de emparejamiento	Empareje el transmisor inteligente con el dispositivo móvil.
No parpadea al pulsar el botón.	Transmisor inteligente apagado	Mantenga pulsado el botón del centro del transmisor durante 3 segundos para encenderlo.
Parpadea en color verde (una vez) al pulsar el botón.	Quedan aproximadamente 24 horas de carga de la batería	No se requiere ninguna acción inmediata.
Parpadea en color naranja (una vez) al pulsar el botón.	Batería baja. Quedan menos de 24 horas de carga de la batería	Cargue la batería pronto.
LED encendido en color naranja durante un minuto	Se ha activado una alerta	Consulte la aplicación en el dispositivo móvil para comprender la alerta.
Parpadea en naranja.	Interrupción de la comunicación entre el transmisor y el sensor, o vinculación aún no efectuada	Coloque el transmisor encima del lugar de inserción del sensor. Si se le pide, vincule el sensor.

Primeros pasos

Carga del transmisor inteligente

Antes de empezar, necesita lo siguiente:

- Un dispositivo móvil compatible.

Para conocer los dispositivos inteligentes y sistemas operativos compatibles, vaya a global.eversensediabetes.com/compatibility.

- Conexión a Internet inalámbrica.
- Transmisor inteligente Eversense 365 completamente cargado.

1. Conecte el extremo estándar del cable USB del adaptador al enchufe de pared.



2. Conecte el extremo micro del cable USB al puerto USB del transmisor inteligente.

Cuando se haya cargado durante unos 15 minutos, una lucecita verde parpadeará en la parte superior del transmisor inteligente. Esa luz verde intermitente significa que al transmisor le quedan aproximadamente 24 horas de funcionamiento. Desconecte el cable USB del transmisor inteligente.



IMPORTANTE: Utilice solo el adaptador de alimentación de CA y el cable USB suministrados con el transmisor inteligente para cargar la batería del transmisor inteligente y nunca inserte ningún objeto distinto al cable de carga en el puerto USD del transmisor. Utilizar otra fuente de alimentación podría dañar el transmisor inteligente, lo cual no permitiría recibir correctamente las lecturas de glucosa, crearía un riesgo de incendio e invalidaría la garantía. Si el adaptador de alimentación o el cable USB se dañaran o perdieran, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar un recambio y garantizar la seguridad en el funcionamiento del dispositivo.

Descargar la aplicación de MCG Eversense 365 y emparejar el transmisor inteligente

Descargar e instalar la aplicación


1. Descárguese gratis la aplicación del App Store de Apple o de Google Play.

Las indicaciones para instalar la aplicación varían según el sistema operativo iOS o Android.

Nota: Cerciórese de que el dispositivo móvil utilice la versión más reciente y compatible del sistema operativo.

2. En la pantalla de instalación, pulse **Instalar aplicación** y siga las instrucciones de instalación.

Al cabo de 1 o 2 minutos, compruebe que en la pantalla del dispositivo móvil aparezca el icono de la aplicación de MCG Eversense 365.



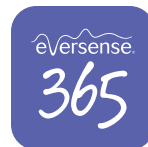


IMPORTANTE: Compruebe que dispone de una conexión a Internet inalámbrica; que la fecha y la hora estén bien en el dispositivo móvil; y que el Bluetooth esté activado antes de continuar.

Nota: Cuando se le indique, revise y pulse **Aceptar** para aceptar las condiciones del acuerdo de licencia. Aparecerá una pantalla de INICIO DE SESIÓN.

Pulse el icono de Eversense 365 para iniciar la aplicación

1. Pulse **Crear cuenta** para crear su cuenta de Eversense.
2. Introduzca la información de su cuenta y, a continuación, pulse **Enviar**.
 - Pulse **Volver al inicio de sesión** para continuar.

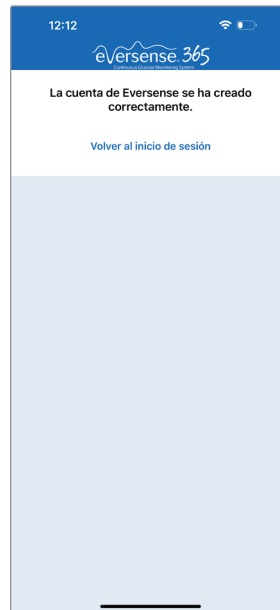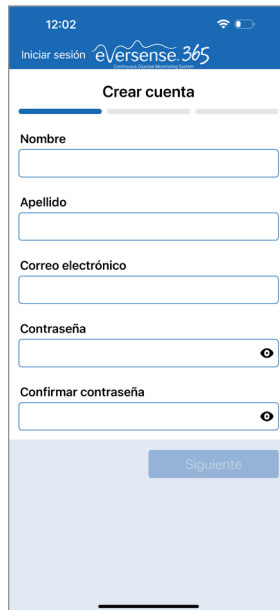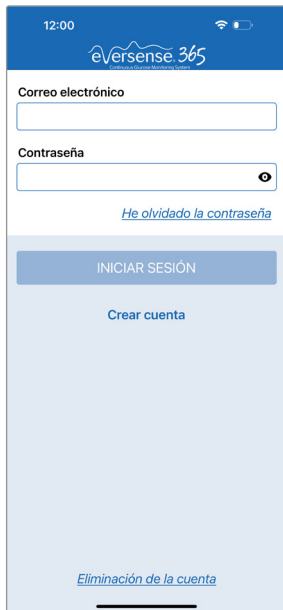

3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, y pulse **INICIAR SESIÓN**.

12:00

eversense 365

Correo electrónico

Contraseña

[He olvidado la contraseña](#)

INICIAR SESIÓN

Crear cuenta

[Eliminación de la cuenta](#)

4. La aplicación le pedirá que active las notificaciones y el Bluetooth.

- Pulse **Siguiente** para continuar.

12:12

eversense 365

Activar las notificaciones

Eversense utiliza las notificaciones para enviarte información importante sobre los niveles de glucosa y el estado del sistema.

Siguiente

12:13

eversense 365

Activar Bluetooth


Debe tener activados los permisos de Bluetooth para que la aplicación móvil Eversense pueda habilitar el emparejamiento con un transmisor inteligente Eversense.

Para recibir alertas y lecturas del sensor cuando la aplicación está en uso o ejecutándose en segundo plano, permita a Eversense utilizar el Bluetooth.

Siguiente

5. La unidad de medida se emplea para calcular y mostrar las lecturas de glucosa. **NO** cambie la unidad de medida hasta que lo consulte con su proveedor sanitario.

- Pulse **Siguiente** para continuar.

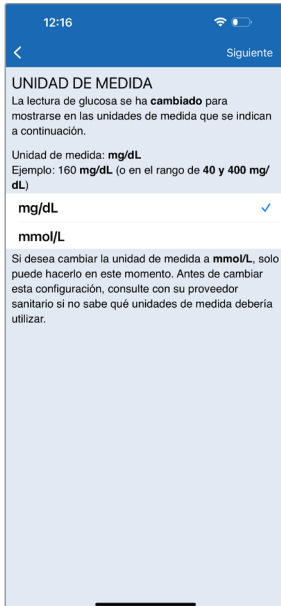

6. Pulse para avanzar por las pantallas introductorias que ofrecen información sobre cuándo tomar decisiones de tratamiento.



7. Seleccione **Tengo transmisor inteligente** y se iniciará la configuración del sistema para emparejar el transmisor inteligente con el dispositivo móvil.



Configuración del sistema



Menú Configuración del sistema

El menú Configuración del sistema será su guía para configurar el sistema. Se mostrarán marcas de verificación al terminar cada paso.

- **Conectar:** empareje el transmisor inteligente con el dispositivo móvil.
- **Vincular sensor:** vincule el sensor insertado con el transmisor inteligente.
- **Fase de calentamiento:** el periodo de 24 horas posterior a la vinculación del sensor con el transmisor inteligente.
- **Fase de inicialización:** introduzca 4 calibraciones con un margen de 2 a 12 horas entre sí.


Conectar

En el menú **Configuración del sistema**, pulse **Conectar** para emparejar el transmisor.

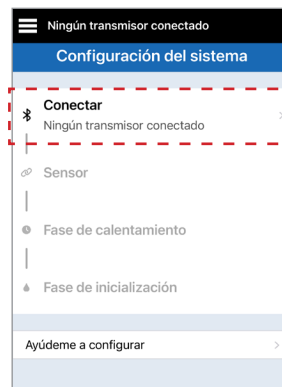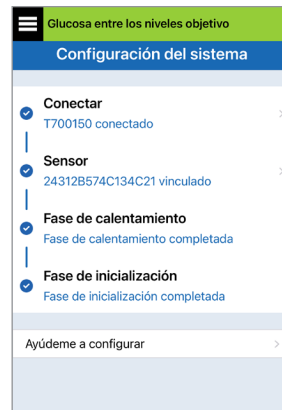


1. Con el transmisor inteligente encendido, pulse el botón tres veces para iniciar el modo de emparejamiento:

El LED parpadeará en azul para indicar que el transmisor inteligente está en modo de emparejamiento.

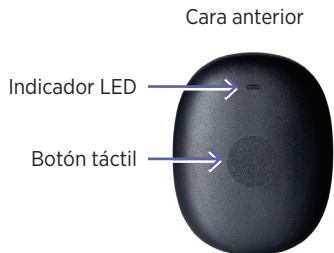

2. En la pantalla **Conectar**, pulse el número de serie del transmisor inteligente (el número de serie del transmisor figura en la parte posterior del transmisor inteligente).

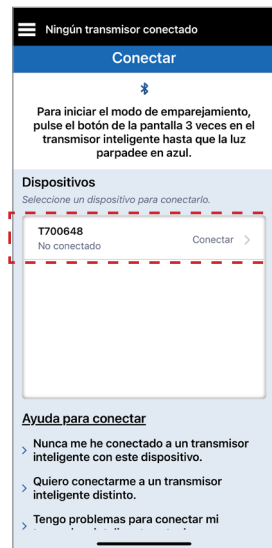


Nota: Su dispositivo móvil debe estar conectado a Internet para emparejarse con el transmisor inteligente. La conexión a Internet solo es necesaria para el emparejamiento.

3. Aparecerá la pantalla emergente **Solicitud de enlace Bluetooth**.

- Pulse **Emparejar**.

Nota: El transmisor inteligente solo se puede emparejar con un dispositivo móvil a la vez.

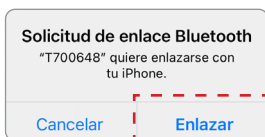

Nota: Si el transmisor detecta que un software aparentemente no válido intenta comunicarse con el transmisor por BLE, se impedirá el emparejamiento del dispositivo.

4. En el apartado **Dispositivo conectado** se mostrará el número de serie del transmisor inteligente y el texto **Conectado** una vez efectuado el emparejamiento. El transmisor inteligente proporcionará vibraciones intermitentes hasta que esté vinculado con el sensor insertado.

- Pulse **Siguiente**.



Vincular el sensor y el transmisor inteligente

Una vez que su proveedor sanitario haya insertado el sensor y usted haya emparejado su transmisor y la aplicación, es necesario vincular el sensor con el transmisor inteligente. Esto iniciará la fase de calentamiento de 24 horas. No hace falta llevar puesto el transmisor inteligente durante la fase de calentamiento. Para vincular el sensor, su dispositivo móvil debe estar conectado a Internet y su transmisor debe estar cargado, encendido y emparejado con su dispositivo móvil.

Cuando vincule el sensor por primera vez, con el apósito Tegaderm™ sobre el lugar de inserción, es probable que la incisión esté en el centro del apósito Tegaderm. Esto significa que el sensor está posiblemente por encima del centro del apósito Tegaderm. La primera vez que vincule el sensor, no utilice un parche adhesivo en el transmisor inteligente. Al colocar el transmisor inteligente sobre el sensor, debe estar ligeramente por encima del centro del apósito Tegaderm.

Consejo: Es posible que su sensor no esté en una posición exactamente perpendicular a la incisión. Si le resulta difícil obtener una señal buena o excelente en la guía de colocación, no ejerza presión. Pruebe a girar ligeramente el transmisor inteligente encima del sensor. Espere aproximadamente 1 segundo a que la guía de colocación se actualice entre cada ajuste de la posición del transmisor inteligente encima del sensor.

Para obtener información sobre cómo vincular el sensor, consulte la sección *Vincular el sensor* en la *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365*.

Pulse **Vincular sensor** para mostrar la guía de colocación.



Colocar el transmisor inteligente encima del sensor

1. Compruebe que el transmisor inteligente esté encendido y que su dispositivo móvil tenga acceso a Internet.
 - Coloque el transmisor inteligente directamente sobre el sensor insertado hasta que la página **Guía de colocación** de la aplicación muestre alguna conexión y mantenga la posición sin ejercer presión.





2. Utilizando las marcas visibles de las esquinas del transmisor inteligente a modo de guía, coloque suavemente el transmisor inteligente hacia la mitad superior del apósito.

Observe la guía de colocación para comprobar la intensidad de la señal (este proceso puede tardar varios segundos).

Para obtener la mejor señal, levante y mueva con suavidad el transmisor inteligente según convenga hasta que la guía de colocación muestre 2 o 3 barras (de buena a excelente).

Consejo: Puede resultar útil mirarse en un espejo mientras coloca el transmisor inteligente.

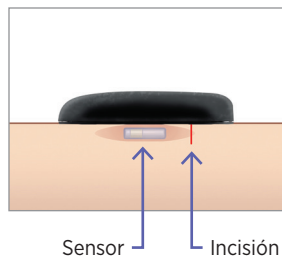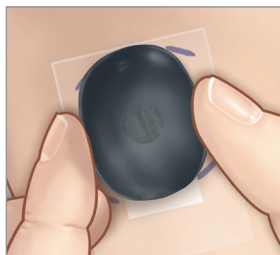


3. Pulse Siguiente.




Vincular sensor detectado

Una vez establecida la señal mediante la guía de colocación, ya puede vincular el sensor.

1. La aplicación mostrará el mensaje **Detectando el sensor**. Mientras lo haga, continúe sujetando el transmisor en su sitio.
2. Cuando aparezca la pantalla **Se ha detectado un sensor nuevo**, pulse **Vincular sensor detectado**.
3. Pulse **Siguiente**.

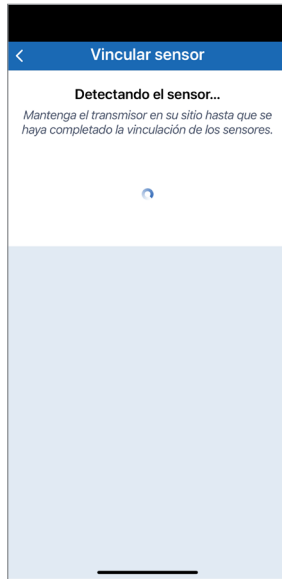

Se iniciará el proceso de vinculación. NO retire el transmisor inteligente del lugar de inserción hasta que no se haya completado la barra de progreso y se muestre el mensaje **Sensor vinculado correctamente**.

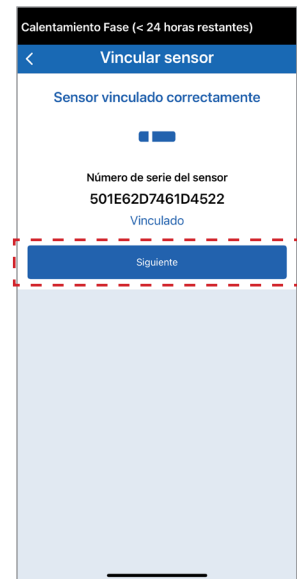

Fase de calentamiento


El sensor necesita una fase de calentamiento de 24 horas para estabilizarse en el cuerpo antes de que el transmisor inteligente empiece a recopilar valores de glucosa. **Durante la fase de calentamiento, no hace falta llevar puesto el transmisor inteligente.** Cuando haya concluido la fase de calentamiento, recibirá una notificación que le informará de que puede continuar con el siguiente paso de configuración del sistema. Llegado ese momento, puede encender el transmisor inteligente y colocarlo encima del sensor con el parche adhesivo. El sistema le pedirá que realice la calibración utilizando la aplicación.

Advertencia


El sistema no ofrecerá lecturas durante:

- La fase de calentamiento de 24 horas.
- Hasta que se realice correctamente una segunda calibración durante la fase de inicialización.
- Durante este tiempo, debe monitorizar su glucosa mediante un glucómetro.


En el menú Configuración del sistema, pulse **Fase de calentamiento** para ver los detalles sobre la duración de la fase de calentamiento.

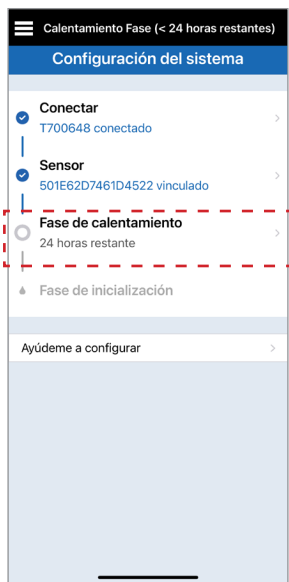

- Pulse **Salir** para ir a la pantalla de inicio.
O bien
- Pulse **Configuraciones de glucosa** para definir los parámetros objetivo y de las alertas.

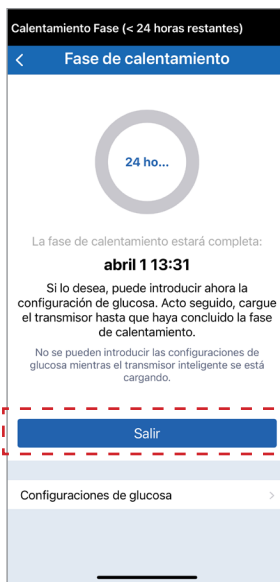

Cuando haya concluido la fase de calentamiento de 24 horas, la aplicación le enviará una notificación para iniciar la fase de inicialización.

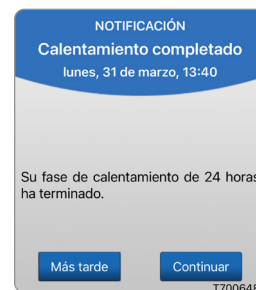


Fase de inicialización

Durante esta fase, se necesitan 4 pruebas de glucemia obtenida con glucómetro a partir de punción digital.


- Las 4 pruebas de calibración deben efectuarse con un margen de 2 a 12 horas entre sí, y todas ellas dentro de un plazo de 36 horas. Después de 8 horas sin una entrada de calibración, no se mostrará ningún dato de glucosa.
- Unos minutos después de completar la segunda calibración correctamente, comenzarán a aparecer lecturas de glucosa en la aplicación.

IMPORTANTE: El transmisor inteligente debe estar encendido, emparejado con la aplicación y vinculado con el sensor para efectuar la calibración.

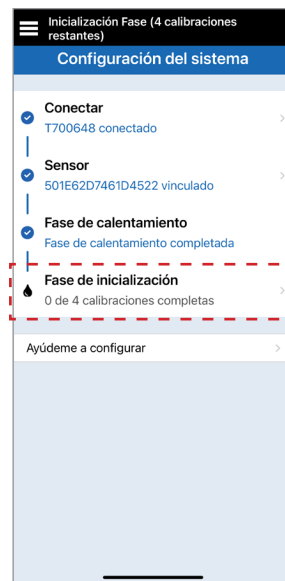



Una vez finalizada la fase de calentamiento, empieza la fase de inicialización y ya puede empezar a ponerse el transmisor inteligente. Durante los primeros días, llevará puesto el transmisor inteligente sobre el apósito Tegaderm™. Empiece siempre con un transmisor inteligente recién cargado.

1. En la notificación **Calentamiento completado**, pulse **Continuar** para iniciar la fase de inicialización.

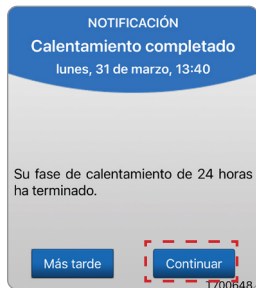

2. Pulse **Guía de colocación**.


Hasta que el transmisor esté sujeto encima del sensor y se haya establecido una señal, la pantalla **Guía de colocación** mostrará el mensaje **No hay señal**.

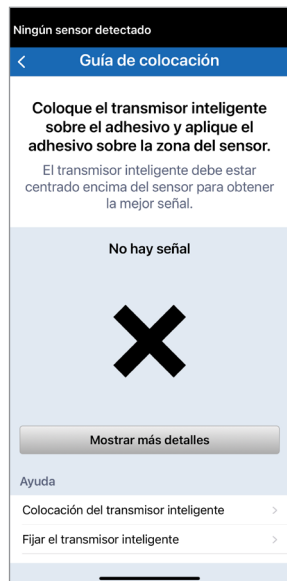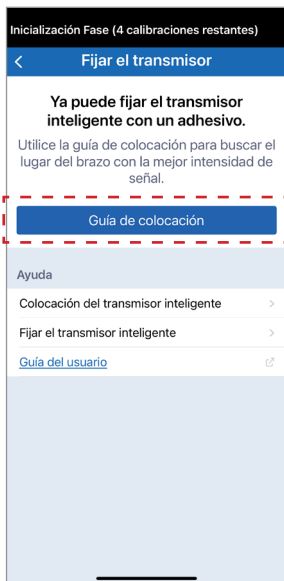

3. Despegue el papel protector del parche adhesivo con el logotipo de Eversense y coloque el transmisor inteligente en el centro.




4. Quite el protector transparente más grande y coloque el transmisor inteligente directamente sobre el sensor. (En los días posteriores a la inserción, cuando lleve puesto el transmisor inteligente sobre Tegaderm, es posible que prefiera retirar primero la parte trasera transparente pequeña.)

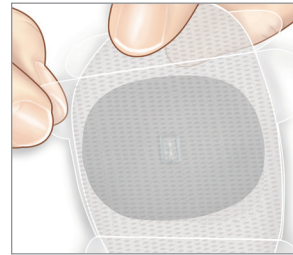

5. Compruebe la conexión entre el transmisor inteligente y el sensor.

- Para obtener la intensidad de señal óptima, el transmisor inteligente debe estar colocado justo encima del sensor. La intensidad de la señal también puede mejorar girando el transmisor inteligente encima del sensor de modo que este último quede centrado verticalmente debajo del transmisor inteligente.

6. Pulse **Siguiente** cuando se establezca la intensidad de la señal.

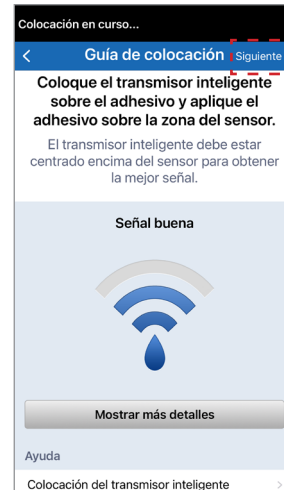

7. Presione el parche adhesivo con firmeza en la superficie de la piel sobre el sensor.




8. Utilice la pestaña para retirar el revestimiento transparente que queda.




Nota: Para obtener más información sobre cómo utilizar la guía de colocación, consulte *Guía de colocación: pantalla Mostrar más detalles* en la sección *Vincular el sensor* de la *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365*.

9. Pulse **Calibrar ahora**. Introduzca la lectura de glucemia del glucómetro. Consulte *Calibrar el sistema* para conocer más detalles sobre cómo introducir las calibraciones.

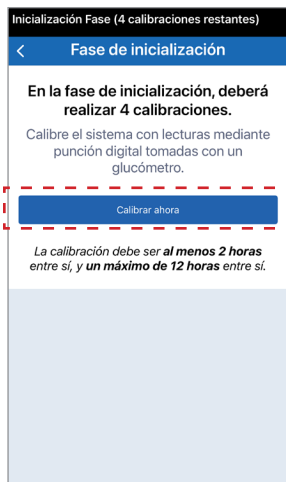

Nota: Recibirá avisos de calibración durante la inicialización cada 2 horas después de la calibración anterior. Puede realizar las 4 calibraciones en tan solo 6 horas. Las 4 calibraciones deben llevarse a cabo en un plazo de 36 horas. Puede anotar los tiempos a continuación a modo de referencia.

Cuando la fase de inicialización haya concluido, el sistema habrá terminado de configurarse.

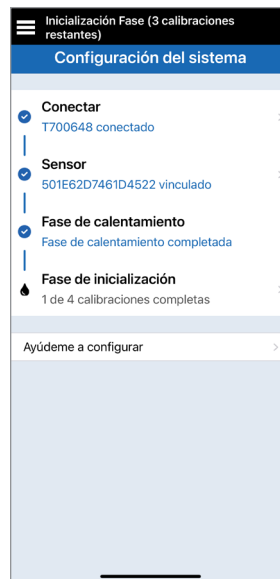

Consejos de calibración:

- Lávese y séquese bien las manos.
- Evite calibrar mientras la glucosa pueda estar cambiando rápidamente (como tras las comidas, después de administrarse insulina o durante el ejercicio o después de él).
- Utilice siempre un valor real de glucemia e introduzca la calibración en un plazo de 10 minutos.
- Mantenga el transmisor inteligente en su lugar encima del sensor durante los 5 minutos anteriores y los 15 minutos posteriores a cada calibración.




Uso diario

Una vez superada la fase de inicialización, el sistema requiere una calibración diaria durante los primeros 13 días. Al cabo de 13 días, el sistema le solicitará que realice la calibración una vez por semana. Consulte la sección *Calibrar el sistema* en la *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365* para obtener más información.

Tomar decisiones de tratamiento

Para tomar una decisión de tratamiento, debe tener en cuenta lo siguiente:



- La información de la barra de estado
- El valor actual de glucosa del sensor (debe aparecer en negro)
- La flecha de tendencia (debería mostrarse una)
- La información y alertas de tendencias recientes

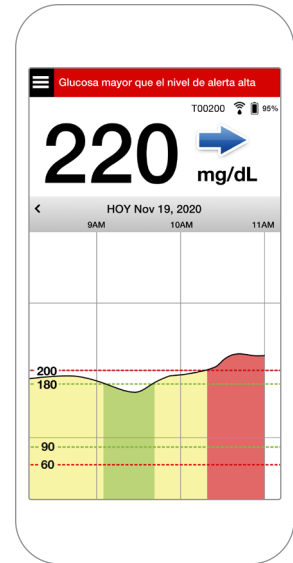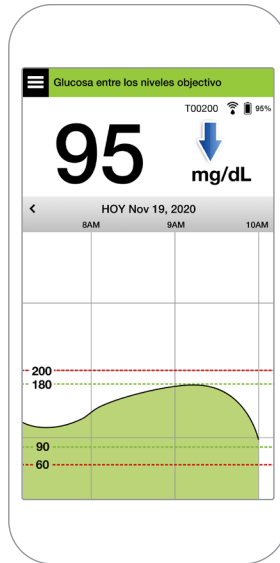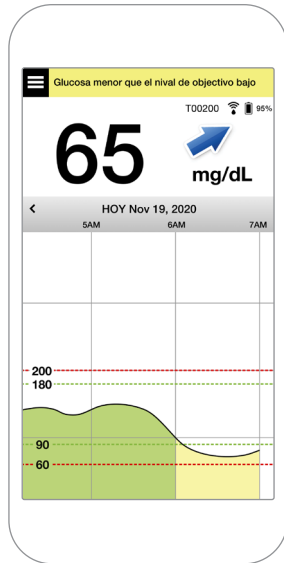

Cuándo NO se debe tomar una decisión de tratamiento:

- Cuando no se muestre ningún valor de glucosa.
- Cuando no se muestre ninguna flecha de tendencia.
- Cuando sus síntomas no coincidan con la información de glucosa mostrada.
- Cuando el valor actual de la glucosa del sensor aparezca en gris.
- Cuando la barra de estado aparezca en naranja.
- Cuando esté tomando medicamentos de la clase de las tetraciclinas.

Nota: Para tomar decisiones de tratamiento, consulte siempre la información de glucosa de la aplicación en el smartphone. No use una visualización secundaria como el Apple Watch o Eversense NOW.

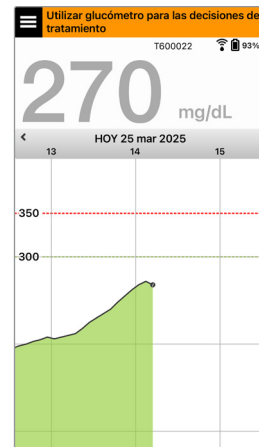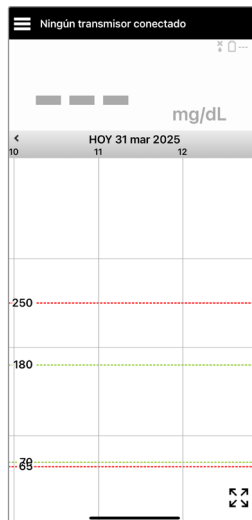




Use toda la información disponible de MCG



Cuándo utilizar el glucómetro








No tome una decisión de tratamiento si:

- Sus síntomas no coinciden con el valor de glucosa del sensor.
 No. Los síntomas no coinciden con la aplicación.
- No se muestran los datos de glucosa o la flecha de tendencia.
 No. Calentamiento Fase (< 24 horas restantes).
T00200 95%
mg/dL
- Aparece el mensaje **Utilizar glucómetro para las decisiones de tratamiento** en la barra de estado de la pantalla de inicio de **Mi glucosa**.
 No. Utilizar glucómetro para las decisiones de tratamiento.
T00200 95%
100 mg/dL
- Actualmente está tomando un medicamento de la clase de las tetraciclinas.

Recurso adicional: *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365: Utilizar la aplicación.*

Control de su diabetes

Entienda las flechas de tendencia: esto puede ayudarle a tomar decisiones más fundamentadas sobre el control de la diabetes.

	Niveles de glucosa en aumento o descenso gradual con una velocidad entre 0,0 mg/dL y 1,0 mg/dL por minuto.
	Niveles de glucosa en aumento moderadamente rápido con una velocidad entre 1,0 mg/dL y 2,0 mg/dL por minuto.
	Niveles de glucosa en disminución moderadamente rápida con una velocidad entre 1,0 mg/dL y 2,0 mg/dL por minuto.
	Niveles de glucosa en aumento rápido, con una velocidad de entre 2,0 mg/dL y 3,0 mg/dL por minuto.
	Niveles de glucosa en disminución rápida, con una velocidad de entre 2,0 mg/dL y 3,0 mg/dL por minuto.
	Niveles de glucosa en aumento muy rápido, con una velocidad superior a los 3,0 mg/dL por minuto.
	Niveles de glucosa en disminución muy rápida, con una velocidad superior a los 3,0 mg/dL por minuto.

Comprender la glucosa del sensor frente a la glucemia

- El sensor mide la glucosa en el líquido del tejido cutáneo, que se conoce como "fluido intersticial". El glucómetro mide la glucosa en la sangre.
- Los niveles de glucosa en el fluido intersticial y en la sangre suelen ser similares. La correcta calibración del sistema es la mejor manera de asegurarse de que sean lo más parecidos posible.
- Las diferencias entre los niveles de glucosa en el fluido intersticial y en la sangre son especialmente evidentes cuando el nivel de glucemia cambia de forma rápida (después de comer, administrar insulina o hacer ejercicio) y, en el caso de algunas personas, durante los primeros días tras la inserción debido a la inflamación que puede causar el procedimiento de inserción.
- Normalmente, la diferencia que se observa es que el nivel de glucosa del sensor varía con un retardo de varios minutos respecto del nivel de glucemia.

Utilizar la aplicación

Sus datos de glucosa aparecerán en la pantalla **MI GLUCOSA** cuando se le haya insertado el sensor y haya empezado a calibrar el sistema.

① Icono de **menú** (véase la página siguiente)

② Icono de **perfil temporal**

③ Icono de **No molestar**

④ Lectura de glucosa actual

⑤ Conexión del transmisor con el sensor o la aplicación

⑥ Porcentaje de carga de la batería del transmisor

⑦ Flecha de tendencia

⑧ Nivel de alerta de glucosa alta -----

⑨ Nivel objetivo de glucosa alta - - - - -

⑩ Nivel objetivo de glucosa baja - - - - -

⑪ Nivel de alerta de glucosa baja -----

⑫ Icono del registro de eventos



Ejercicio



Insulina




Evento múltiple



Calibración




Alerta de predicción de glucosa alta

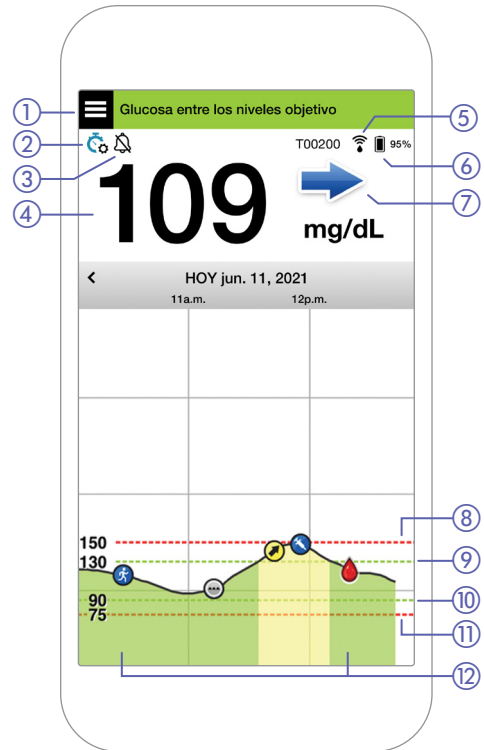


Icono de menú

Pulse el icono de **MENÚ** (☰) en la parte superior izquierda de cualquier pantalla para desplazarse a cualquiera de las opciones de menú disponibles:

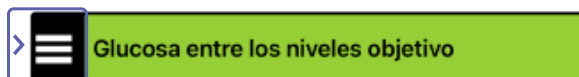

- Mi glucosa
- Calibrar
- Guía de colocación
- Registro de eventos
- Informes
- Compartir mis datos
- Historial de alertas
- Configuración del sistema
- Conectar
- Configuración
- Acerca de

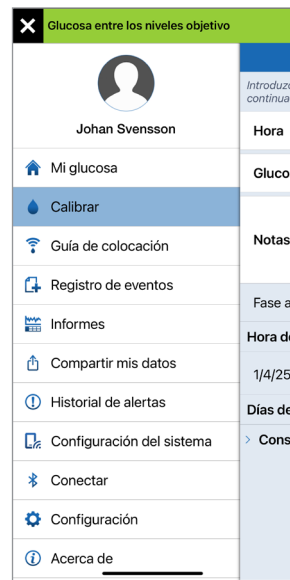

Menú principal

Alertas

- El dispositivo móvil y el transmisor inteligente proporcionan, AMBOS, alertas para notificarle que las lecturas de MCG han alcanzado una determinada configuración de alertas o que el sistema de MCG requiere atención.
- Consulte la *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365* para obtener una lista completa de las alertas de la aplicación.

Barra de estado de la aplicación

- **Fase de calentamiento:** se aplica después de vincular el transmisor inteligente y el sensor por primera vez.
- **No se ha detectado ningún sensor:** aparecerá cada vez que retire el transmisor inteligente de encima del sensor.
- **No hay ningún transmisor conectado:** aparecerá si el transmisor inteligente está apagado, cargándose o fuera del alcance de su dispositivo móvil.
- **Utilizar glucómetro para las decisiones de tratamiento:** aparecerá cuando deba realizar un control de punción digital de confirmación antes de tomar una decisión de tratamiento.



Consejo: Es posible que aparezca una alerta de **No se ha detectado ningún sensor** en la aplicación. Esto ocurrirá si el transmisor inteligente está encendido, pero no en su brazo. Para borrar la alerta, pulse **Ahora no**.





**Transmisor encendido,
pero no encima del sensor**



Transmisor apagado

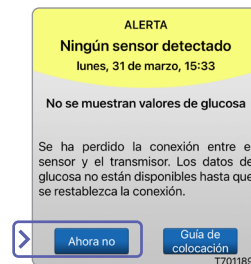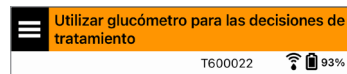

Configuración personalizada

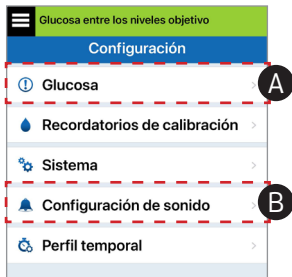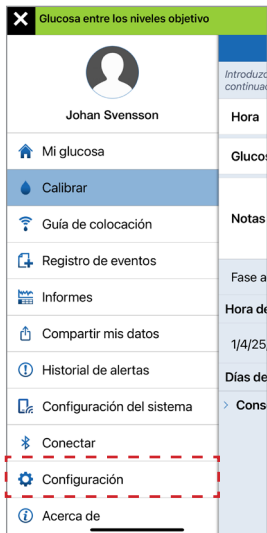


A Configure las alertas y objetivos de glucosa



Consejo: Si es la primera vez que utiliza la MCG, espere a establecer alertas predictivas o de velocidad de cambio hasta que se acostumbre a llevar puesto el sistema.


B Defina la frecuencia de repetición de las alertas

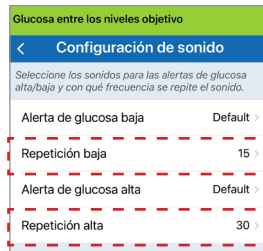

Los sonidos de las alertas también se pueden personalizar. Consulte la [sección 8 de la guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365](#).

Alertas y notificaciones: vista, oído y tacto

Alertas y notificaciones	Patrón de vibración del transmisor inteligente
Alertas cuando no se pueden mostrar valores de glucosa y la batería del transmisor está descargada	3 vibraciones prolongadas
Alertas relativas a la glucosa baja y fuera de rango	3 vibraciones cortas x 3
Alertas relativas a predicciones de glucosa baja	3 vibraciones cortas
Alertas relativas a la glucosa alta	1 vibración prolongada y 2 cortas
Alertas relativas a la batería baja del transmisor	3 vibraciones cortas y 1 prolongada x 2
Alertas relativas a problemas menos críticos o notificaciones	1 vibración corta

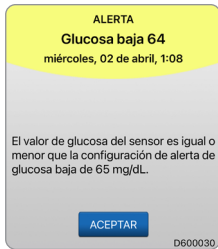


Consulte *Descripciones de las alertas* en la *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365* para obtener más información.

Para acceder al historial de alertas:

Menú > Historial de alertas

- Las alertas pueden clasificarse.

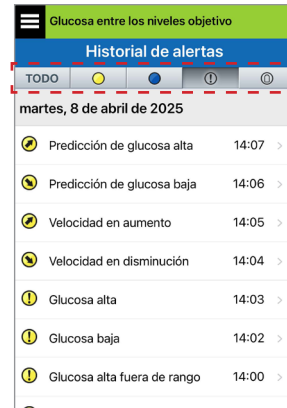

Acceder a su cuenta de DMS

Siempre tendrá la sesión abierta en su cuenta a través de la aplicación, pero para obtener un acceso total a todos sus datos, solo tiene que ir a **global.eversensedms.com** e introducir su información de inicio de sesión.

Recuerde que sus datos de inicio de sesión son los mismos que utilizó al crear la cuenta de Eversense.

Nota: Para compartir sus datos de Eversense con su proveedor sanitario, pídale su número de ID de la clínica de Eversense. Consulte la *Guía del usuario del sistema de MCG Eversense 365* para más información sobre cómo compartir datos con su proveedor sanitario a través de la aplicación.

Información de contacto

- Si tiene alguna duda médica o pregunta sobre el plan de tratamiento de su diabetes, póngase en contacto con su proveedor sanitario.
- Si tiene alguna duda técnica sobre el sistema de MCG Eversense 365, póngase en contacto con su equipo local de atención al cliente de Eversense.

Llame a 900 264 123 para acceder al servicio de atención al cliente.



Manufactured by:
Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
global.eversensedidiabetes.com

Patentes: www.senseonics.com/products/patents



Apple App Store y Google Play y sus productos son marcas comerciales de sus titulares respectivos o están protegidos por copyright de dichos titulares.



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



EU:

MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands



(241) LBL-7603-06-001_REV_B